

SIKKERHETS-/AMPUTASJONSSEIL




MONTERINGSINSTRUKSJONER
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
RENGJØRINGSINSTRUKSER



BRUKSANVISNING FOR SIKKERHETS-/AMPUTASJONSSEIL


Sikkerhets-/Amputasjonsseilet er en videreutvikling av Quickfit-konstruksjonen, og er konstruert til å passe 95 % av alle brukere. Den gir et mer komfortabelt løft med større støtte uten behov for sidebøylor. Den er tilgjengelig med polstring og uten polstring pluss hodestøtte, og den fås i fem størrelser - extra large, large, medium, small og pediatric.

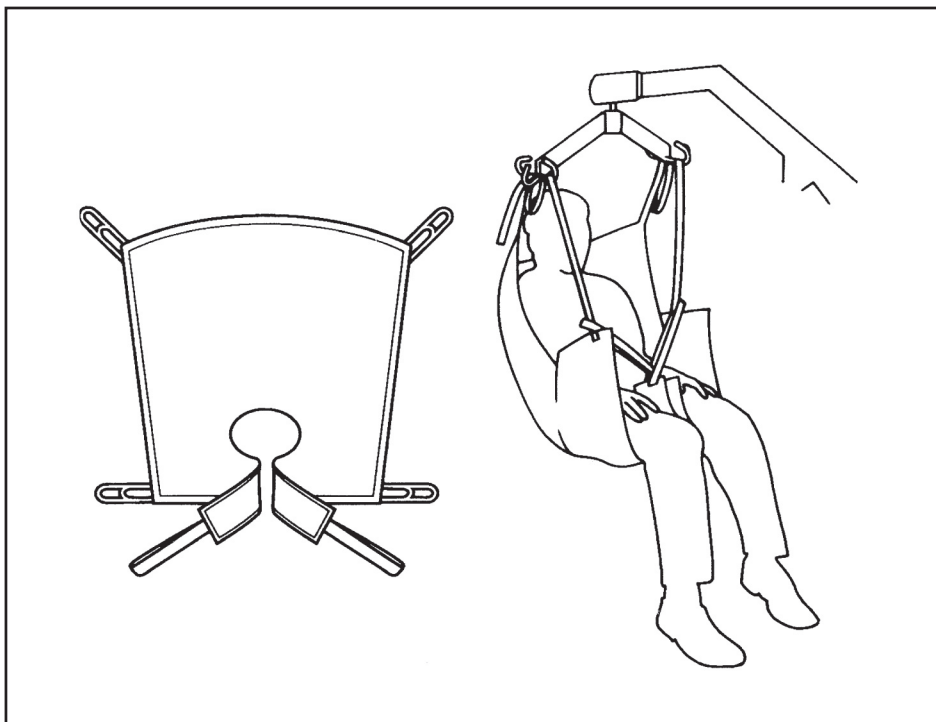


ANDRE SEIL KAN FÅS FOR Å DEKKE INDIVIDUELLE BEHOV. HUSK AT DU ALLTID BØR RÅDFØRE DEG MED EN SALGSREPRESENTANT FØR INNKJØP.




MONTERING I SITTEDE STILLING

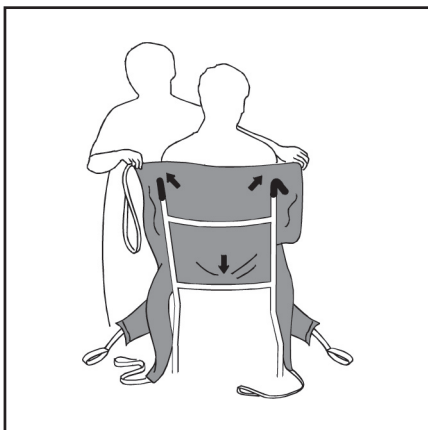


Pass på at håndtakene og sømmene på seilet peker utover. Skyv seilet ned bak pasienten, med toalettstolåpningen plassert nederst langs ryggraden. Kontroller at seilet sitter rett over skuldrene.

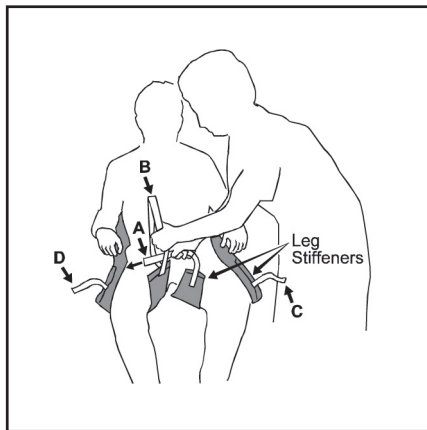

Trekk den lengste innleggsdelen for beinet framover slik at den er parallell med pasientens lårbein. Pass på at beinstroppen ikke er vridd, og trekk den korteste innleggsdelen for beinet under og opp mellom pasientens bein. Gjenta prosessen med det andre beinet. Kryss stroppen A gjennom stropp B.

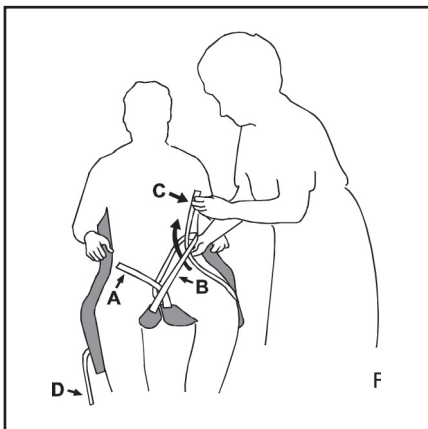


Trekk stropp C opp gjennom stropp B. Gjenta prosessen for det andre beinet ved å trekke stropp D gjennom stropp A.

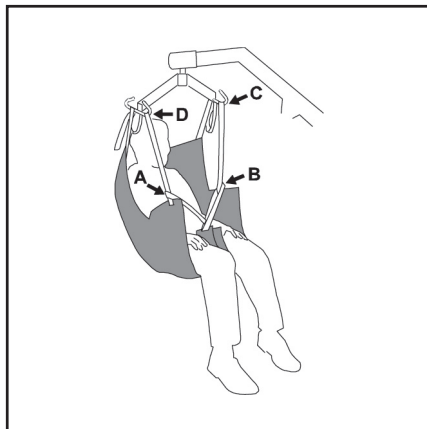


Kontroller at seilet ligger glatt under pasienten og at stillingen er komfortabel. Flytt løfteren i stilling og fest beinstroppene til løftebøylen ved bruk av de fargede løkkene. Dette gjør at brukeren sitter i en rett stilling. Det kan være at heisen flytter seg mot pasienten når du gjør dette. Når pasienten settes ned på nytt, kan håndtakene brukes for å oppnå en god stilling.

ALTERNATIV SITTENDE STILLING

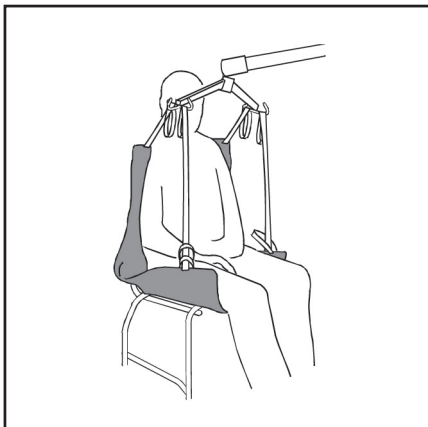


Hvis pasienten sitter med beina sammen, kan stroppene krysses under begge beina og festes slik som vist i diagrammet. Pass på at beinstroppene C og D trekkes gjennom stroppene A og B, og deretter festet til sprederstangen. Dette vil gi ekstra komfort og kan brukes på enkelte amputerte.

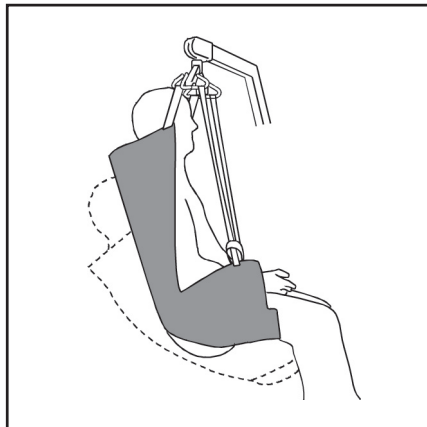


Lengre skulderstropper vil gjøre at brukeren sitter mer tilbaketent.

LIGGENDE STILLING

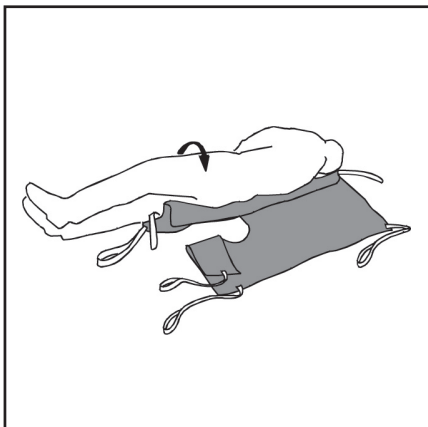

Flytt brukeren opp på seilet ved bruk av et stikkklaken. Pass på at toalettåpningen er plassert sentrert nederst langs ryggraden.

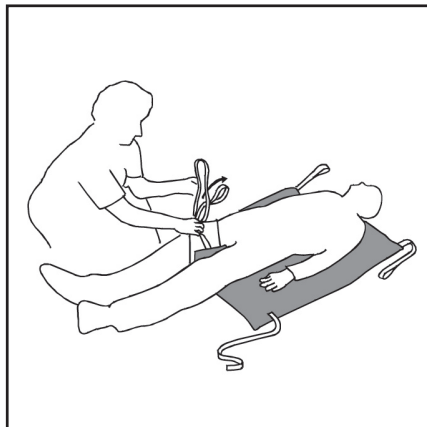

Kryss beinstroppene A og B under og mellom brukers bein, og trekk stropp A gjennom stropp B. Trekk stropp C og D gjennom de lange løkkene på stroppene A og B. Fest deretter seilet til sprederstangen på samme måte som for sittende stilling.


Sunrise Medical anbefaler at seil kontrolleres regelmessig for frynsing eller skade før bruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR SIKKERHETS-/AMPUTASJONSSEIL

TEST STANDARD	NS-EN ISO 10535
MAKS. BRUKERVEKT	227kg

STØRRELSER

Hvert seil er markert med følgende fargekodede symboler, hvorav fire vil være strøket ut. Seilet din er den størrelsen som ikke er strøket ut; i dette eksempelet er det Small (Rød).

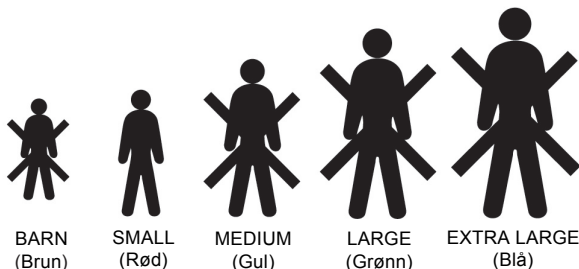

RENGJØRINGSINSTRUKSER

Hvert seil er merket med følgende rengjøringsinstrukser.

IKKE VASK MED BLEKEMIDDEL

Bleking vil ødelegge materialet. Seilet kan bli ødelagt under vasking og tørking. Kontroller seilet før hver gangs bruk. Blekede, opprevde, delvis kuttete, opptrevlede eller slitte seler er usikre og kan medføre alvorlige helseskader eller livsfare for pasienten.

Ødelegg og kasser utslitte seil. Ikke foreta endringer på seilet. Maskinvask varmt. Tørkes på lav temperatur i tørketrommel, lufttørkes eller tørkes ved meget lav temperatur.



BESTILLINGSKODE	NO	Sikkerhets-/Amputasjonseil (polyester)	Sikkerhets-/Amputasjonseil (dusj/bad)	Sikkerhets-/Amputasjonseil (polstret)	Sikkerhets-/Amputasjonseil polstret m/ hodestøtte (poly)
		1048	1051	1053P	1060P
BARN (BRUN)	SL	1048	Spesial	Spesial	Spesial
SMALL (RØD)	SL	1050	1051	1050P	1060P
MEDIUM (GUL)	SL	1053	1054	1053P	1063P
LARGE (GRØNN)	SL	1056	1057	1056P	1066P
EXTRA LARGE (BLÅ)	SL	1058	Spesial	Spesial	Spesial



Sunrise Medical AS
Dynamitvn. 14B, 1400 Ski

Tlf: +47 66 96 38 00
Fax: +47 66 96 38 80
www.sunrisemedical.no



Sunrise Medical Limited
High Street Wollaston
West Midlands DY8 4PS England
Tel: 01384 44 66 88
Fax: 01384 44 66 99
www.sunrisemedical.com

Part no. 374-90010N
Rev A