

TOALETTSEIL




MONTERINGSINSTRUKSJONER
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
RENGJØRINGSINSTRUKSER



BRUKSANVISNING FOR TOALETTSEIL


Toalettseilet er spesielt konstruert for å hjelpe pasienter med toaletterrutinene. Seilet er enkelt å montere, er føret for å gi god komfort, så det er lett å ta av og på tøy. Dette er ikke et seil for generell bruk, og passer kun til ca. 25 % av alle brukere. Våre salgsrepresentanter kan gi ytterligere råd.

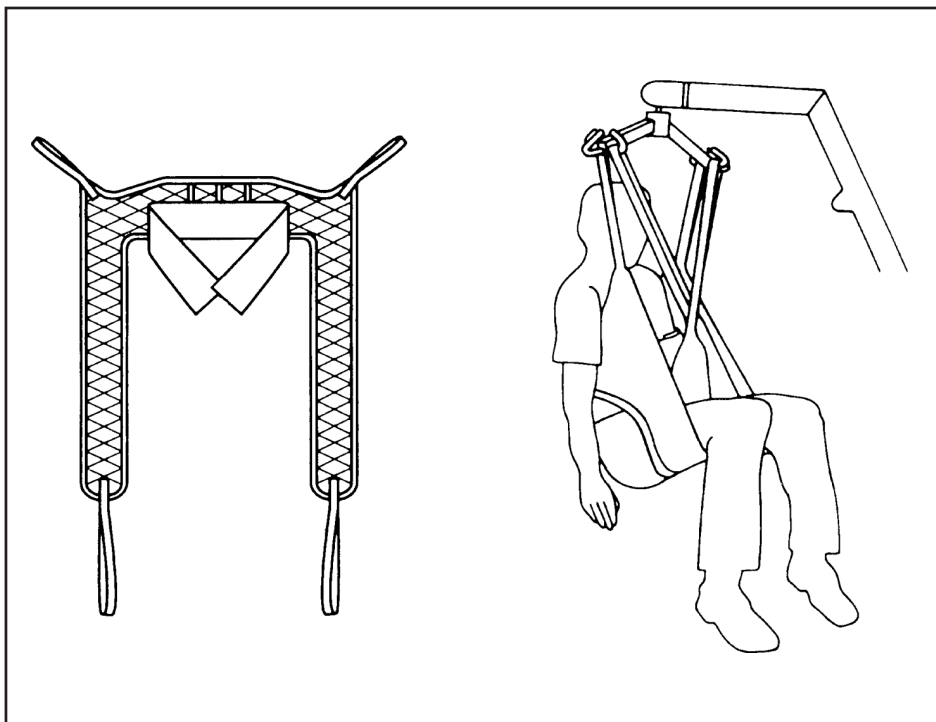

FLERE SELER OG SEIL ER TILGJENGELIGE FOR INDIVIDUELLE BEHOV. HUSK AT DU ALLTID BØR RÅDFØRE DEG MED EN SALGSREPRESENTANT FØR DU GÅR TIL INNKJØP AV ET SEIL.




MONTERING I SITTEDE STILLING

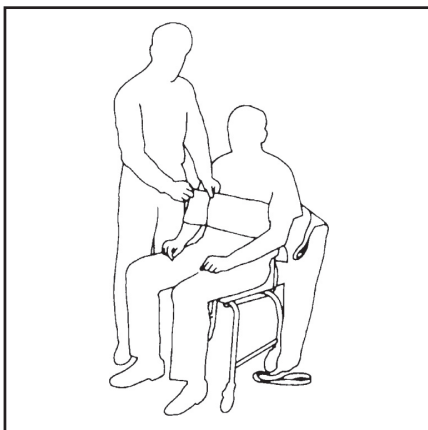


Skyv seilet ned langs ryggen til den sitter rett under skulderbladene og over midjen. Fest borrelåsen rundt brukerens brystkasse. Det er ikke nødvendig å stramme remmen hardt.



Hev brukerens ben og før stroppen under og opp mellom bena. Pass på at seilet ikke er vridd eller brettet under pasientens lår. Gjenta prosessen med det andre benet.

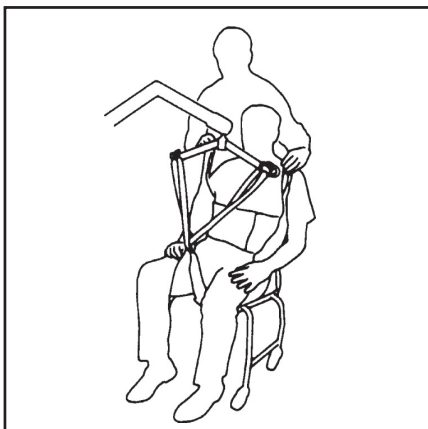


Kryss beinstroppene og fest dem til løfteren på krokene foran med den lengste løkken. Hev løfteren noe og fest skulderstroppene til den bakre kroken (en rettere sittestilling oppnås ved bruk av den korteste løkken). Løfteren vil kanskje flytte seg mot pasienten når dette gjøres. Husk at bremsene IKKE skal settes på når seilet skal settes på brukeren.

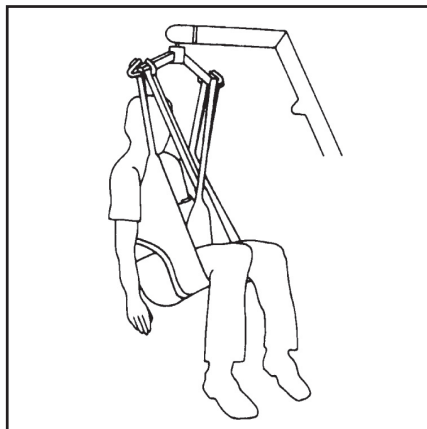


Hev løfteren til påkrevet høyde. Når brukeren settes ned igjen, vil et lett trykk på låret sørge for en god stilling.

ALTERNATIV SITTENDE STILLING

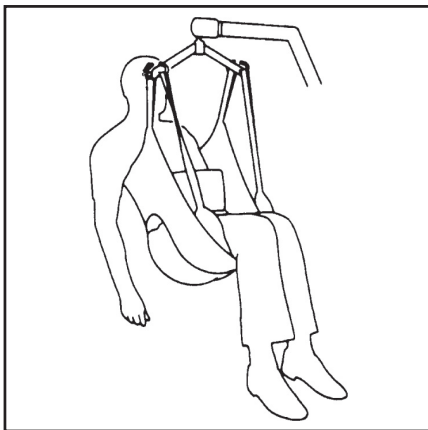

Når pasienten sitter med beina sammen, kryss stroppene under begge beina og fest dem til løfteren, som vist. Dette kan gjøre det mer komfortabelt.

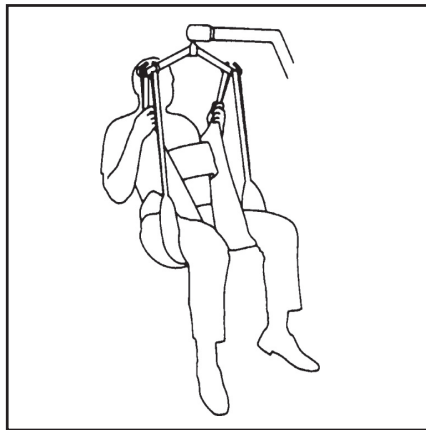

Enkelte brukere liker at beinstroppen føres ned mellom lårene og deretter trekkes på utsiden av beina, som vist i diagrammet.

MONTERING I LIGGENDE STILLING


Det anbefales ikke å bruke seilet i denne situasjonen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR TOALETTSEILET

TEST STANDARD	NS-EN ISO 10535
MAKS. BRUKERVEKT	227kg

STØRRELSER

Hvert seil er markert med følgende fargekodede symboler, hvorav fire vil være strøket ut. Seilet din er den størrelsen som ikke er strøket ut; i dette eksempelet er det Small (rød).

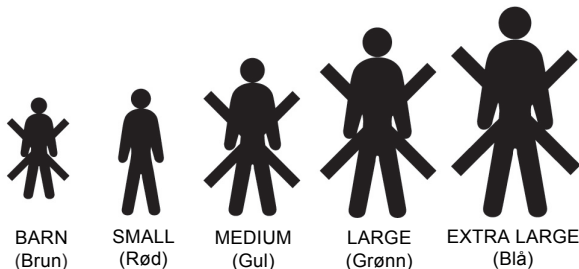

RENGJØRINGSINSTRUKSER

Hvert seil er merket med følgende rengjøringsinstrukser.

IKKE VASK MED BLEKEMIDDEL

Bleking vil ødelegge materialet. Seilet kan bli ødelagt under vasking og tørking. Kontroller seilet før hver gangs bruk. Blekede, opprevde, delvis kuttete, opptrevlede eller slitte seler er usikre og kan medføre alvorlige helseskader eller livsfare for pasienten.

Ødelegg og kasser utslitte seil. Ikke foreta endringer på seilet. Maskinvask varmt. Tørkes på lav temperatur i tørketrommel, lufttørkes eller tørkes ved meget lav temperatur.



BESTILLINGSKODE	NO		
	BARN (BRUN)	SL	1600 (Polyester)
	SMALL (RØD)	SL	1601 (Polyester)
	MEDIUM (GUL)	SL	1603 (Polyester)
	LARGE (GRØNN)	SL	1606 (Polyester)
	EXTRA LARGE (BLÅ)	SL	1608 (Polyester)



Sunrise Medical AS
Dynamitvn. 14B, 1400 Ski

Tlf: +47 66 96 38 00
Fax: +47 66 96 38 80
www.sunrisemedical.no



Sunrise Medical Limited
High Street Wollaston
West Midlands DY8 4PS England
Tel: 01384 44 66 88
Fax: 01384 44 66 99
www.sunrisemedical.com

Part no. 374-90020N
Rev A