

OXFORD | HOYER

Oxford®/Hoyer® Advance

Mobil og sammenleggbar personløfter

Løftekapasitet:
155 kg

*Brukerhåndbok
og garanti*

PRODUSENTS KONTAKTINFORMASJON



UK

Sunrise Medical Ltd

High Street, Wollaston, Stourbridge,
West Midlands
DY84PS UK
+44 (0) 1384 44 66 22
Fax: +44 (0) 1384 44 66 44
www.sunrisemedical.co.uk

NORWAY

Sunrise Medical AS


Rehabsenteret
1450 Nesoddtangen
Norway
Tlf: +47 66 96 38 00
Fax: +47 66 96 38 80

INNHOLDSFORTEGNELSE


1. Oxford/Hoyer Advance Personløfter	3
2. Innledning: Informasjon om din personløfter	4
3. Monteringsanvisning	5
4. Demontering	6
5. Sikkerhetsregler	10
6. Bruksinstruksjoner	12
7. Vedlikeholdsplan	16
8. Tekniske spesifikasjoner	18
9. Service, reparasjoner, kontroll og tester	20

1. OXFORD/HOYER ADVANCE PERSONLØFTER

OXFORD/HOYER ADVANCE LØFTER (KLAR TIL BRUK)

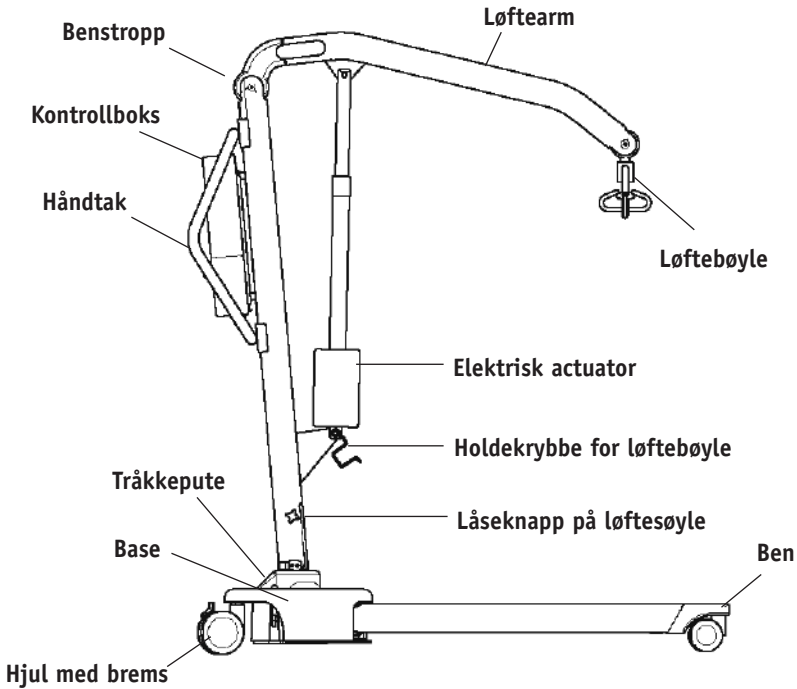

OXFORD/HOYER ADVANCE LØFTER (SAMMENLAGT STILLING)

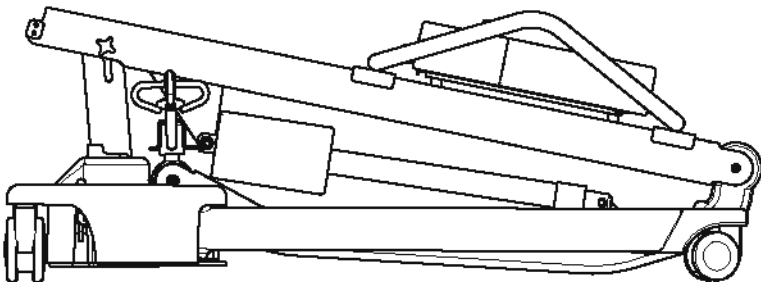

2. INNLEDNING: OXFORD/HOYER ADVANCE PERSONLØFTER

INFORMASJON OM DIN PERSONLØFTER

Bruksformål:

Formålet med løfteren er å forflytte en bruker fra én overflate til en annen (slik som fra en seng til en rullestol). Det anbefales ikke at en person kjøres i et seil, SELV IKKE over korte avstander.

Oxford/Hoyer Advance kan fås i to modeller, hydraulisk eller elektrisk. Denne brukerhåndboken dekker begge modellene. Hver løfter er montert, testet og godkjent før den er demontert og pakket/transportert.

Forpakningen er en kraftig, spesialtilpasset kartong som brukes til transport både i inn- og utland, for å forsikre om at du mottar din løfter i korrekt stand. Forskjellige dokumenter leveres sammen med heisen, og disse skal oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse.

- KONTROLLKORT
- FORHANDLERS GARANTIKORT
- BRUKERHÅNDBOK
- KUNDETILFREDSHETSKORT

KONTROLLKORTET er et viktig dokument. Oppbevar det på et trygt sted slik at du har det for hånden ved behov. For riktig vedlikehold av din personløfter, les avsnittet "Vedlikeholdsplan" i denne håndboken. Hvis du er usikker på vedlikeholdskravene er i ditt land, kan du kontrollere dette med din lokale forhandler og/eller velferdssentral.

Oxford/Hoyer Advance brukes til følgende KATEGORIER av løft, innenfor arbeidsparametrene som er spesifisert for løfterne i avsnittet TEKNISKE SPESIFIKASJONER.

- Kategori A – Rullestoler
- Kategori B – Senger
- Kategori C – Bad (avhengig av konfigurering)
- Kategori D – Toalett/Dusj-stol
- Kategori E – Gulv
- Kategori F – 90-graders rotasjon

Oxford/Hoyer Advance-løfteren kan benyttes til brukere i SITTENDE, SITTENDE/LIGGENDE og LIGGENDE stillinger. Følgende seil kan brukes med denne løfteren:

- Oxford/Hoyer Quickfit Løfteseil u/hodestøtte
- Oxford/Hoyer Løfteseil m/hodestøtte
- Oxford/Hoyer Sikkerhets/Amputasjonsseil
- Oxford/Hoyer Løftelaken
- Oxford/Hoyer Toalettseil

CE merket



Oxford/Hoyer Advance er CE-merket og overholder kravene i følgende EC-direktiver:

- Medical Device Directive (93/42/EEC)
- EMC Directive (89/336/EEC) (Kun strømkretser)
- Low Voltage Directive (73/23/EEC) (Kun strømkretser)

3. MONTERINGSANVISNING

INNHold I KARTONGEN

Plasser kartongen på gulvet med god arbeidsplass, og åpne den forsiktig. Kartongen inneholder:



- OXFORD/HOYER ADVANCE
- PLASTLOMME MED DOKUMENTASJON
- HÅNDKONTROLL (kun elektrisk modell)
- BATTERIPAKKE (kun elektrisk modell)
- BATTERI LADELEDNING (kun elektrisk modell)
- HYDRAULISK ENHET (kun hydraulisk modell)

SIKKERHETSVARSEL– Oxford/Hoyer Advance er tung og må derfor løftes forsiktig. Det kan være du trenger hjelp til å løfte den ut av kartongen.



MONTERINGSANVISNING

1. Pakk ut alle delene fra kartongen og legg dem på gulvet. Vær forsiktig slik at du ikke skader noen av delene eller lager riper i lakken.


Løft Advance forsiktig ut av kartongen. Sett løfteren i oppreist stilling (trekantet stilling)

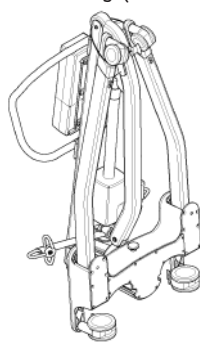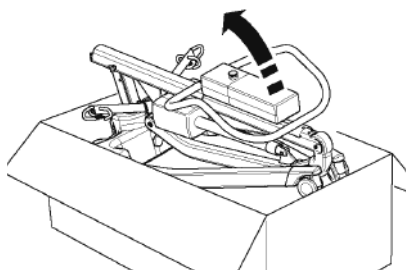

2. Fjern festestroppen som sitter rundt hjulene for å frigjøre bena og løftesøylen. Stroppen vil trekke seg inn øverst på søylen.

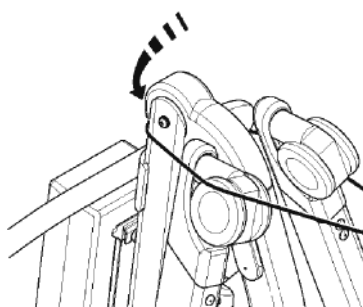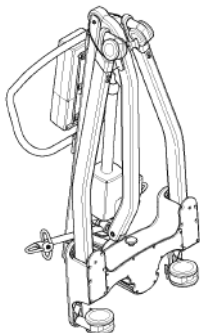


3. Legg løfteren flatt på gulvet (pass på at bremsene er satt på bakhjulene).

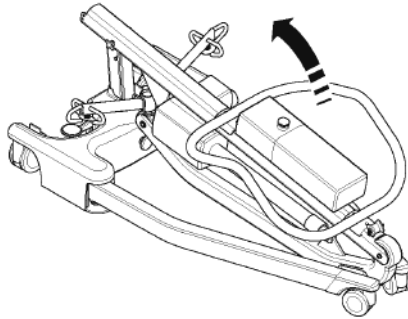


4. Løft søylen oppover (ved bruk av håndtaket), skyv deretter søylen ned i åpningen (1), stram låseknappen på søylen (2), og koble fra bremsene på hjulene (3).


ADVARSEL - Unngå å klemme fingrene. Hold fingrene unna enden på masten når den settes ned i sokkelen. Lås løftesøylen og koble fra bremsene på bakhjulene.

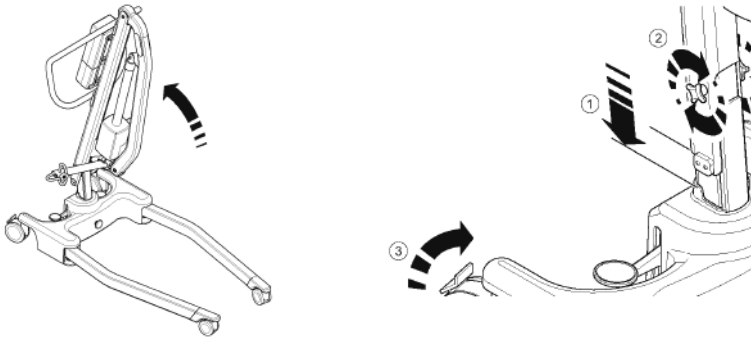

5. Åpne bena helt. SØRG FOR at låsesplinten for bena sitter inntil rammen, slik at bena ikke kan åpnes og lukkes fritt. Bena vil da kun åpnes og lukkes ved bruk av pedalen som er montert bak på rammen.

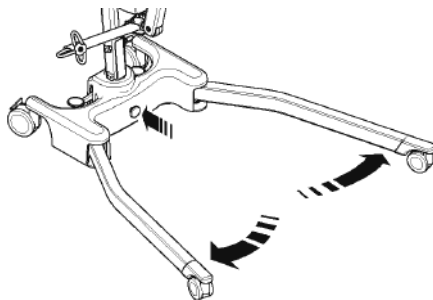


6. Frigjør løftebøylen fra holdekrybben, og løfteren er nå klar til bruk.

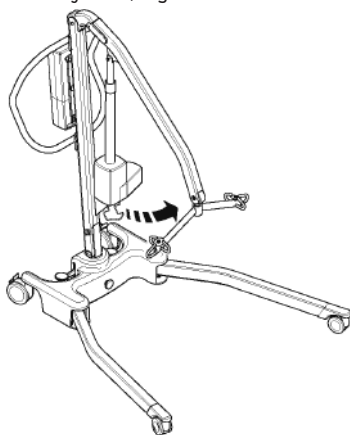


4. DEMONTERING

1. Senk løftearmen lengst mulig ned, og plasser løftebøylen i holdekrybben. Add: Sett på bremsene på hjulene.

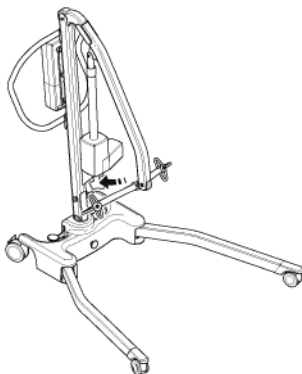


2. Frigjør låsesplinten for bena (trekk den ut fra rammen), og lukk bena helt sammen.

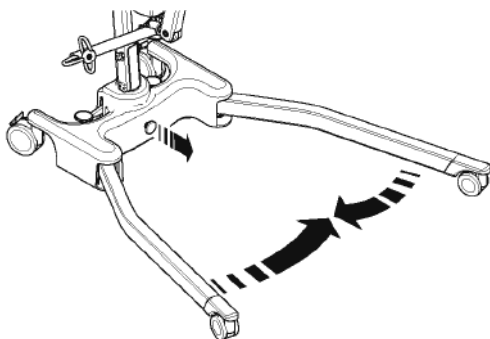


3. Skru opp låseknappen på søylen (2) (ikke skru den helt ut), løft opp søylen og løftearmen (3), og legg dem forsiktig ned mot bena på løfteren. Bruk håndtaket når du gjør dette.

MERK- Hvis du vil fjerne søylen og løftearmen helt fra rammen og bena, kan du gjøre dette ved å skru låseknappen på søylen helt opp (skru den ut), og deretter løfte søylen og løftearmen ut av rammen. Pass på at du ikke mister låseknappen og låsesplinten.

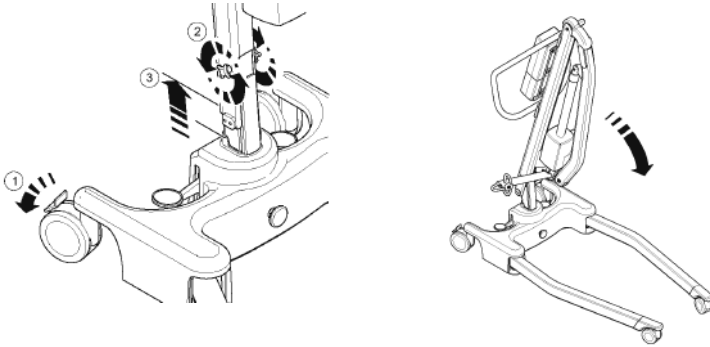


4. Sett den sammenlagte Advance-løfteren i oppreist stilling (ved å holde fast i bena og håndtaket). Pass på at søylen og løftearmen holdes sammen når løfteren reises opp.

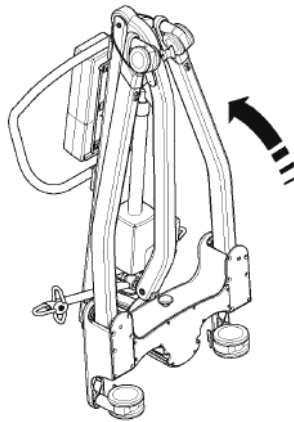

5. Trekk festestroppen hardt oppover og fest den rundt hjulene. (Stroppen vil holde bena, søylen og løftearmen samlet under transport eller oppbevaring av løfteren).

MERK– Vær forsiktig når løfteren åpnes/lukkes, da det kan være fare for å klemme fingrene. Følg alle instruksjonene nøye og be om hjelp dersom du er usikker på noe.

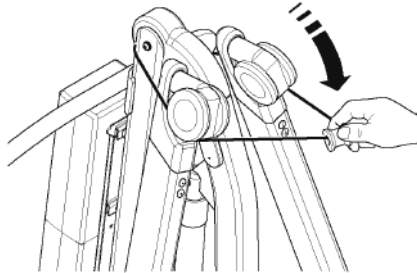

KONTROLLER FØLGENDE FØR LØFTEREN BRUKES

- Kontroller at bena er låst i åpen stilling (se monteringsanvisningene, punkt 5)
- Kontroller at søylen er låst forsvarlig på plass (se monteringsanvisningene, punkt 4)
- Kontroller at bena på løfteren åpnes og lukkes som de skal.
- Kontroller at den røde nødstoppbryteren som er plassert under styreboksen står i posisjon AV (OFF).
- Trykk på opp og ned-knappene på håndkontrollen og kontroller at løftearmen hever og senker seg.
- Sett batteriet på plass i løfteren og sørg for at smekklåsen som holder enheten på plass låses forsvarlig. "Klikk" den på plass.

KUN HYDRAULISKE MODELLER

- Lukk løseventilen på det hydrauliske systemet ved å vri knappen på enheten mot høyre.

MERK – Løseventilen krever minimal tilstrømning, og skal kun strammes for hånd. IKKE bruk kraft på ventilknappen da dette vil skade ventilen.

- Pump hendelen på den hydrauliske enheten for å kontrollere at den hever løftearmen.
- Vri løseventilen helt mot venstre for å kontrollere at løftearmen senkes. Løftearmen vil ikke senkes ned med mindre det er tyngde på den. Legg litt tyngde på løftearmen for å senke den ned.

MERK – Løseventilen åpnes og stoppes helt ved mindre enn to fulle omdreininger av knappen.

5. SIKKERHETSREGLER

Vennligst les og følg sikkerhetsreglene nedenfor. Det er enkelt å bruke en Oxford/Hoyer-personløfter. Ved å følge disse sikkerhetsreglene vil du få trygg og problemfri bruk av løfteren.

LES IGJENNOM OG FORSTÅ INSTRUKSJONENEN I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BRUKER "ADVANCE"-LØFTEREN.

ADVARSEL–Viktig sikkerhetsinformasjon om farer som kan føre til alvorlige personskader

VIKTIG–Informasjon som vil forhindre at produktet skades.

MERK–Informasjon du bør være spesielt oppmerksom på.


ADVARSEL

- Planlegg **ALLTID** løftet før du gjennomfører det.
- Utfør **ALLTID** punktene på den **DAGLIGE KONTROLLISTEN** (side 16) før du bruker løfteren.
- Gjør deg **ALLTID** godt kjent med løfterens håndkontroll og sikkerhetsfunksjoner før du skal løfte en bruker.
- Bruk **ALDRI** seil som ikke er godkjent for denne løfteren.
- Pass **ALLTID** på at seilet passer brukeren du skal løfte, og at det har riktig størrelse og kapasitet.
- Bruk **ALDRI** et seil som er slitt eller skadd.
- Tilpass alltid **SEILET** i henhold til instruksjonene.
- Sjekk **ALLTID** at brukervekten ikke vil overskride løfterens maksimale kapasitet.
- Utfør **ALLTID** løftet i henhold til instruksjonene i brukerveiledningen.
- Koble **ALDRI** fra håndkontrollen eller sikkerhetsutstyret i den tro at løfteren vil bli lettere å håndtere.
- Løft **ALDRI** en bruker med bremsene på. La alltid løfteren finne det riktige tyngdepunktet.
- Prøv **ALDRI** å flytte løfteren ved å dytte på løfterens søyle, løftearm eller brukeren selv.
- Flytt **ALLTID** heisen ved bruk av håndtaket.
- Senk **ALLTID** brukeren til den laveste og mest komfortable stillingen før brukeren forflyttes.
- Hold **ALLTID** lav hastighet når du flytter løfteren med brukeren ombord (3 km/time 0,8 m/sekund).

- Kjør ALDRI løfteren over et ujevnt underlag, spesielt hvis en bruker sitter i løfteren.
- Når en bruker sitter i løfteren, må du ALDRI dytte/dra løfteren over hindringer som forhjulene ikke kan forsere.
- Bruk ALDRI makt på hånd-/sikkerhetskontrollen. Alle kontrollinnretningene er enkle å bruke, og det er ikke nødvendig å bruke makt for å få dem til å virke.
- Når en bruker sitter i løfteren må den ALDRI parkeres i noen form for hellinger.
- Bruk ALDRI en elektrisk løfter i dusjen.
- Lad ALDRI opp en elektrisk løfter på et bad eller et rom med dusj.
- Løft ALDRI en bruker med mindre du har mottatt grundig opplæring og er kompetent til å gjøre dette.
- LØFTEREN er beregnet til å løfte personer. Bruk ALDRI løfteren til andre formål enn dette.
- Kjør ALDRI løfteren nedover trappetrinn, verken med eller uten bruker.
- Forsøk ALDRI å kjøre løfteren ned en helling som overstiger et stigningsforhold på 1:12 (ca. 5 grader).
- Kjør ALDRI løfteren ned en helling uten en medhjelper tilstede.
- Kontroller ALLTID at løfteren ikke står til oppladning før du flytter den, da dette kan skade de elektriske tilkoblingene.

6. BRUKSINSTRUKSJONER

DRIFTSKONTROLLER FOR OXFORD/HOYER ADVANCE

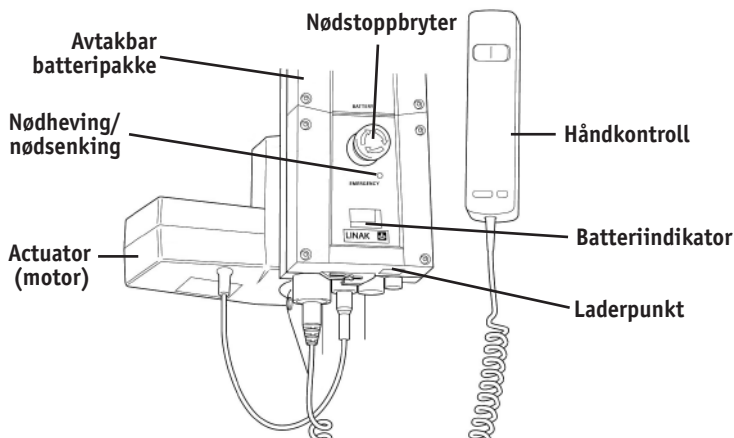

BRUKSINSTRUKSJONER

1. Benjustering.

Bena på Oxford/Hoyer Advance er justerbare i bredden. Bena kan åpnes for å gjøre det lettere å komme til lenestoler eller rullestoler. Ved forflytning og passering gjennom trange dører eller passasjer, må bena på løfteren være i lukket stilling.

For å justere bena, finn pedalen bak på rammen og trykk ned på høyre side av pedalen (DOWN) for å åpne bena og ned på venstre side (UP) for å lukke bena. Benjusteringen kan utføres når en bruker sitter i løfteren. Derimot skal denne justeringen kun utføres når løfteren er i bevegelse, både med og uten bruker.

⚠ ADVARSEL

Utfør aldri et løft når bena er i lukket/sammenslått stilling. Bena skal kun være lukket når løfteren skal transporteres eller oppbevares.

2. Hjul og bremseser

Personløfteren har to låsbare hjul som benyttes ved parkering. Bremsene skal ikke være satt på når en bruker løftes. Løfteren vil da være i stand til å flytte seg til løftets tyngdepunkt. IKKE sett på bremsene under et løft, da dette vil gjøre at det er brukeren som svinger til tyngdepunktet, noe som kan være forvirrende og ubehagelig for brukeren.

3. Heving og senking av løftearm (elektriske modeller)

Løftearmen blir drevet av en kraftig, elektrisk actuator som styres ved hjelp av en enkel håndkontroll. Håndkontrollen har to knapper med retningspiler som peker OPPOVER og NEDOVER. Actuatoren stopper automatisk når løftearmen er hevet eller

senket så langt den går. Håndkontrollen plugges inn i støpslet nederst på styreboksen. Håndkontrollen er utstyrt med en krok slik at den kan hektes til søylen eller løftearmen når den ikke er i bruk.

4. Nødstopp (kun elektrisk modell)

Den røde nødstoppknappen er plassert på batterienheten og aktiveres når den trykkes inn. Aktivering av nødstoppknappen vil kutte all strømtilførsel til løfteren. For å sette i gang løfteren på nytt, må du vri knappen mot klokken og deretter slippe den opp.

5. Nødheving/nødsenking

Knappene for nødheving/nødsenking er plassert bak på styreboksen. Denne funksjonen kan aktiveres ved å sette spissen på en vanlig kulepenn inn i knappen som er uthevet med "senke/heve". Dette vil heve eller senke løftearmen dersom håndkontrollen skulle svikte.

6. Mekanisk nødsenking (elektrisk nødsenking)

Dersom løfteren er helt uten strømtilførsel f.eks. ved et strømbrydd, kan den mekaniske nødsenkefunksjonen i den elektriske actuatoren brukes (RØD BOSS). Denne funksjonen vil kun virke dersom en bruker sitter i løfteren. Ved å trekke den oppover vil funksjonen aktiveres, slik at løftearmen senkes sakte nedover.

7. Batterier

Batteriene beskyttes mot fullstendig utladning ved hjelp av en ALARM FOR LAV BATTERISTRØM. Alarmen vil utløses når batteriene trenger oppladning og håndkontrollen er i bruk. Alarmen vil utløses uansett om håndkontrollen brukes eller ikke. ADVARSEL: OVERSE ALDRI DENNE ALARMEN. Fullfør løfteoperasjonen og start oppladningen av heisen (se instruksjer om opplading).

8. Heving og senking av løftearm (hydrauliske modeller)

ADVARSEL

Kun autorisert og kompetent fagpersonell skal løsne eller skru ut festebolten på den hydrauliske jekken. Utfør aldri et løft hvis brukeren må rotere den hydrauliske jekken. Hvis brukeren må utføre en kraftig rotering av jekken, kan den treffe brukeren eller forårsake uforutsett skade til bruker og/eller pleier.

Heving og senking av løftearmen skjer ved hjelp av en kraftig hydraulisk ramme som blir drevet av to enkle håndkontroller. Løseventilen er en sølvfarget, stjerneformet knott, og pumpehåndtaket som brukes til å heve løftesøylen er en lang spak montert på siden av den hydrauliske enheten. Ventilen lukkes ved å vri knotten forsiktig helt mot høyre. Når ventilen er lukket, pump det lange håndtaket ved bruk av myke, jevne bevegelser for maksimal effekt. Håndtaket trekkes fra en rettvinklet stilling og ned i en 90 graders bue. La alltid håndtaket stå loddrett når det ikke er i bruk.


BRUK ALDRI makt ved å tvinge håndtaket oppover eller nedover. Den hydrauliske enheten kan roteres slik at håndtaket kan brukes på begge sider av løfteren. For å senke løftearmen, skru løseventilen mot venstre. Løseventilen er progressiv, dvs. jo mer åpen den er, desto raskere vil løftearmen senkes. Ventilen er også begrenset, slik at nedsenkingen er kontrollert selv om ventilen er åpnet helt. På denne måten kan nedsenkingen gjøres "hands-free". Hvis løseventilen kun er åpnet litt (en kvart omdreining), vil den reduserte farten gi operatøren anledning til samtidig å assistere brukeren slik at løftet blir mer bekvemt. HUSK alltid på å lukke løseventilen før du begynner en løfteoperasjon. Løseventilen trenger kun et enkelt trykk for å åpnes og lukkes. BRUK ALDRI overdreven makt når du åpner eller lukker ventilen. Det er ikke nødvendig og kan skade ventilen.

9. Seil

Det utvalgte seilet festes til krokene på løfteopphenget. Hvert seil leveres med instruksjoner. Les nøye igjennom instruksjonene for personløfteren og seilet før bruk. Når du har valgt det rette seilet for brukeren, festes seilet til krokene på løfteopphenget.

INSTRUKSJONER FOR OPPLADING AV BATTERIENE I OXFORD/HOYER ADVANCE

Lade batteriene ombord i løfteren

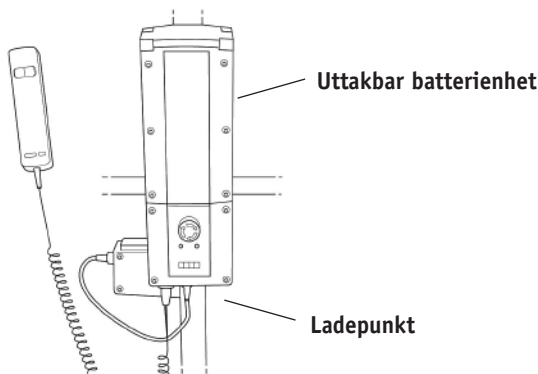

Batteriene er plassert i batterienheten og lades ved hjelp av en kontakt nederst på styreboksen.

1. Sett ladepluggen inn i ladepunktet nederst på styreboksen. Skyv kontakten rett inn i ladepunktet. IKKE vri kontakten i punktet.
2. Sett støpselet for batteriladeren i en veggkontakt og slå laderen PÅ (ON).
3. Oppladingen skjer helt automatisk. LCD-lampen viser ladestatusen. Merk: Selv om laderen blir stående i stikkkontakten over lengre tid, vil den allikevel ikke overlade batteriene.
4. Når du skal bruke løfteren på nytt, slår du først hovedbryteren på laderen AV (OFF) før du trekker kablen ut fra veggkontakten.

Lade batteriene med en ekstern lader

Batteriene i Advance-løfteren kan også lades opp ved bruk av en ekstern lader. Dette kan gjøres ved å sette ladekabelen inn nederst på styreboksen og deretter koble kabelen til et vegguttak. Oppladingen skjer helt automatisk. For å bruke løfteren på nytt, fjerner du ganske enkelt kabelen. Batteriindikatoren vil vise hvor mye batteriene har blitt ladet opp. Vi anbefaler at batteriene lades helt opp før løfteren brukes på nytt.

ADVARSEL

- **IKKE bruk løfteren under opplading.**
- **Vær forsiktig slik at du ikke snubler i ladekabelen.**
- **Kontroller ALLTID at løfteren ikke står til opplading før du flytter den, da dette kan skade de elektriske tilkoblingene.**
- **ADVARSEL: HOLD batteriene fullladde. Lad løfteren hver gang den ikke er i bruk. Laderen vil ikke "overlade" batteriene.**
- **ADVARSEL: La aldri batteriene lades helt ut. Så snart du hører varselalarmen for lav batteristrøm, må du kun fullføre løfteoperasjonen du holder på med og sette løfteren til opplading.**
- **ADVARSEL: La ALDRI løfteren bli stående ubrukt over lengre tid uten å lade den opp jevnlig.**
- **ADVARSEL: Pass alltid på at laderen er slått av før den kobles til eller fra løfteren.**
- **ADVARSEL: La aldri laderen være koblet til løfteren dersom laderen er slått av.**
- **ADVARSEL: Koble aldri fra laderen ved å trekke i ledningen.**
- **Lad ALDRI opp en elektrisk løfter på et bad eller et rom med dusj.**

7. VEDLIKEHOLDSPLAN FOR OXFORD/HOYER ADVANCE

Alle Oxford/Hoyer-produkter er konstruert for minimalt vedlikehold, men enkelte sikkerhetskontroller og prosedyrer er derimot påkrevd. En plan over DAGLIGE oppgaver er spesifisert nedenfor. En liste over reservedeler er tilgjengelig ved forespørsel.

DAGLIG KONTROLLISTE

Sunrise Medical Ltd anbefaler på det sterkeste at følgende kontroller utføres dagelig samt hver gang løfteren skal brukes.

- KONTROLLER at løfteren beveger seg fritt og at hjulene glir lett.
- KONTROLLER at løfteopphenget kan rotere og svinge fritt. Kontroller at opphenget er godt festet til løftearmen.
- KONTROLLER krokene for festing av seil på opphenget og sidestroppene for eventuell slitasje. Ikke bruk disse om du er i tvil.
- KONTROLLER at seilet ikke er frynset eller skadd på annen måte. Bruk ALDRI et seil som er skadd eller slitt.
- KONTROLLER at bena kan åpnes og lukkes lett.
- TEST håndkontrollen eller den hydrauliske enheten for å se at løftearmen hever og senker seg tilfredsstillende.
- KONTROLLER at løfteren ikke gir signal om lav batteristrøm når håndkontrollen brukes (kun elektriske løftere). Hvis alarmen går må heisen IKKE brukes, og batteriet må straks lades opp.
- På elektriske løftere, KONTROLLER at nødstoppfunksjonen virker.
- På hydrauliske løftere, KONTROLLER for hydraulisk væskelekkasje. Ved det minste tegn på lekkasje, ta omgående kontakt med et serviceverksted, og sørg for at løfteren ikke brukes før lekkasjen er reparert.

VEDLIKEHOLD, KONTROLL OG TESTER

Sunrise Medical anbefaler en grundig og regelmessig inspeksjon av Oxford/Hoyer Advance og dens tilbehør, seil, osv. Hvor ofte testene skal utføres varierer fra land til land. Du må derfor kontakte din lokale forhandler eller velferdssentral for å finne ut hvor ofte testene skal utføres. Kontrollen og testen skal gjennomføres i henhold til de anbefalte prosedyrene nedenfor. Sunrise Medical Ltd anbefaler at vedlikehold, inspeksjon og testing utføres av autorisert verksted/forhandler.

MERK - Disse anbefalingene er i samsvar med kravene i direktiv 1998 No2307 Health and Safety: The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998. Dette er et direktiv i Storbritannia. For land utenfor Storbritannia, vennligst kontroller lokale forskrifter.

***DISSE TESTENE SKAL OMFATTE:**

	Innløpende tester	Tester før bruk	Serviceintevaler
1. LØFTEBØYLE: Kontroller at opphenget roterer og svinger fritt. Undersøk om dreietappen er slitt. Sjekk også at opphenget er godt festet til løftearmen.	✓	✓	
2. LØFTEARM: Kontroller festet som kobler løftearmen til løftesøylen. Kontroller at det er minimal sidebevegelse av løftearmen, og at den roterer fritt på kulelageret.		✓	✓
3. LØFTESØYLE: Kontroller at låsemekanismen på løftesøylen virker som den skal. Sjekk at søylen er forsvarlig festet i sokkelen. Kontroller festet for den nedre actuatoren eller den hydrauliske enheten.	✓	✓	
4. ACTUATOR (kun elektrisk modell): Actuatoren trenger ikke annet vedlikehold enn at du kontrollerer at den virker som den skal og at det ikke kommer unormale lyder fra den.			✓
5. BATTERIENHET (kun elektrisk modell): Kontroller funksjonen til nødstopknappen samt nødsenkning/nødheving.	✓	✓	
6. BATTERIER (kun elektrisk modell): Batteriene er plassert i batterienheten og trenger ikke annet vedlikehold enn regelmessig oppladning, slik beskrevet i instruksjonene for oppladning av batteriene. Kontroller at batterikablene er rene.			✓
7. HYDRAULISK ENHET : Den hydrauliske enheten krever ikke annet vedlikehold enn at du kontrollerer at den virker som den skal og at det ikke er antydning til væskelekkasje i hydraulikken.		✓	✓
8. BENJUSTERING: Kontroller at bena åpnes og lukkes som de skal (innover/utover).	✓	✓	
9. HJUL: Kontroller at alle hjulene er godt festet til bena. Kontroller at både trinser og hjul kan rotere fritt.	✓	✓	
10. RENGJØRING: For rengjøring, bruk vanlig såpe og vann og/eller desinfiserende middel på de harde overflatene. Unngå sterke kjemiske rensmidler eller slipemidler, da disse kan skade lakken på løfteren. Unngå å søle vann på de elektriske komponentene.			✓
11. BELASTNINGSTEST: Belastningstesten skal utføres i henhold til produsentens testprosedyrer.			✓
12. RAMME OG HJUL: Pass på at rammen står jevn og støtt (med alle fire hjulene på gulvet).	✓	✓	
13. SEIL: Kontroller at seilet ikke er slitt eller frynset.		✓	
14. SMØRING: Smør dreietappleddene, inkludert løftesøyle og løftearm, pedal og løfteopphegsledd (om nødvendig).			✓

8. OXFORD/HOYER ADVANCE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

ELEKTRISKE OG HYDRAULISKE MODELLER

Spesifikasjoner	Elektrisk	Hydraulisk
Maksimal løftevekt	155Kgs	155Kgs
Maksimal total lengde	1300mm	1250mm
Minimal total lengde	1250mm	1200mm
Maksimal total høyde	1860mm	1845mm
Minimal total høyde	1360mm	1350mm
Dimensjoner, sammenlagt		
Høyde	450mm	470mm
Dybde	1180mm	1230mm
Bredde	550mm	550mm
Oppheng maks. høyde	1690mm	1640mm
Oppheng min. høyde (anvendelig)	390mm	390mm
Høyde ved maksimalt omfang	1170mm	850mm
Omfang ved maksimal høyde	650mm	710mm
Omfang ved minimal høyde	350mm	390mm
Maksimalt omfang*	835mm	850mm
Snudiameter	1420mm	1380mm
Ben åpne – Utvendig bredde	1080mm	1110mm
Ben åpne – Innvendig bredde	1000mm	1160mm
Ben lukket – Utvendig bredde	670mm	640mm
Ben lukket – Innvendig bredde	570mm	550mm
Total høyde på ben	115mm	120mm
Gulvklaring	30mm	30mm
Forhjul par	75mm	75mm
Bakhjul med brems	100mm	100mm

* Omfang = Senter av oppheng til front av løftesøyle

Vekt

Mast, sokkel og løftearm	28.9kgs	26.8kgs
Batterienhet	2.8kgs	N/A
Totalt	31.7kgs	26.8kgs
Ramme (uten batteri)	14.9kgs	14.9kgs
Løftesøyle og løftearm (uten batteri)	14.0kgs	11.9kgs

Alle mål er innen +5 / -5 graders toleranse.

ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

BATTERIER: 12-volts oppladbare forseglede blysyrebatterier

BATTERIKAPASITET: 3,2 Ampere pr. time

NOMINELL INNGANGSSPENNING FOR LADER: 230V vekselstrøm 50/60 Hz

NOMINELL UTGANGSSPENNING FOR LADER: 27,4/29,0 V likestrøm ved 0,8A

ELEKTRISK STØTBESKYTTELSE

LADER – KLASSE II

LØFTER - INTERN STRØMKILDE

GRAD AV STØTBESKYTTELSE

LADER – TYPE B

LØFTER – TYPE B

SEIL BRUK/TYPE OXFORD/HOYER GRÅ MED STROPPER

BRUKSOMRÅDE:>+5° <+40°

Bruk utenfor disse områdene kan påvirke personløfterens funksjonalitet og sikkerhet.

9. SERVICE, REPARASJONER, KONTROLL OG TESTER

Sunrise Medical Ltd har et etablert nettverk av autoriserte leverandører og forhandlere, som vil være behjelpelige med alle forespørsler du eventuelt har om kjøp, garanti, reparasjoner og vedlikehold.

Et frankert kundetilfredshetskort følger med alle våre personløftere. Vennligst fyll det ut og send det til ditt lokale Sunrise Medical-kontor. Våre produkter leveres med toårs garanti fra kjøpedato.

Denne garantien dekker personløfterens hovedstruktur, actuator, styreboks, håndsett og batteri.

Vi anbefaler at alle våre produkter bestilles gjennom din forhandler. Forhandleren bruker et garantiprogram, så det er viktig å oppbevare navnet, adressen og telefonnummeret til forhandleren slik at du lett kan ta kontakt dersom det skulle oppstå problemer.

Hvis du er usikker på hvor produktet ble kjøpt, kan Sunrise Medical hjelpe deg å finne leverandøren dersom du oppgir serienummeret på personløfteren.

HUSK - Ta kontakt med leverandøren din for spørsmål angående kjøp, garanti, reparasjoner, service og vedlikehold.

Dette produktet er levert av:

Sunrise Medical AS

Rehabsenteret

1450 Nesoddtangen

Norway

Tlf: 66 96 38 00

Fax: 66 96 38 80

e-post: post@sunrisemedical.no



Sunrise Medical Ltd.

Sunrise Business Park
High Street
Wollaston, West Midlands DY8 4PS
ENGLAND
44-138-444-6688

Sunrise Medical AS

Rehabsenteret 1450 Nesoddtangen
Tlf: +47 66 96 38 00
Fax: +47 66 96 38 80
E-post: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no