

Monteringsanvisninger

Quickie Helium

Armlen	2
Brems	3
Drivhjul alle typer	4
Drivring.....	5
Eikebeskytter.....	6
Fotbøyle og fotplate	7
Fotfikseringsplater	8
Hoftebelte.....	9
Kambringshylse	10
Kjørehåndtak.....	11
Klesbeskytter i aluminium og karbon	12
Klesbeskytter kompositt, avtakbart	13
Koffertholder.....	14
Kompaktbrems	15
Kompaktbrems lettvekt	16
Krykkeholder	17
Leggbånd	18
Rammebeskytter/Frontbeskytter	19
Ryggtrekk.....	20
Setetrekk fast.....	21
Svinghjul	22
Tippesikring avtagbar	23
Tippesikring SA	24
Transportfeste	25

Monteringsanvisning


Armlen – Helium

HMS art.nr:

Lev.art.nr:

Armlene mrs Quickie Helium/Helium Lett kort hø	194590	066873-001
Armlene mrs Quickie Helium/Helium Lett kort ve	194591	066873-002
Armlene mrs Quickie Helium/Helium Lett lang hø	194592	066873-011
Armlene mrs Quickie Helium/Helium Lett lang ve	194593	066873-012

Monter armlensfestet på rammen enligt bilden. Holderen der armlenet skal settes i skal være på utsiden av rammen. Da rullestolen er utstyrt med fast sete kan skinnen som denne er festet i behøves løsnes noe. Dette for å kunne få inn festet på riktig plass. Festet monteres fast med skruene 2.1 og 2.2 (se bilde). Deretter monteres armlenet ved at stikkes ned i holderen. Armlenet låses automatisk på plass. Da armlenet skal løsnes, trykkes den loddrette spaken inn hvorefter armlenet kan løftes ut av holderen.

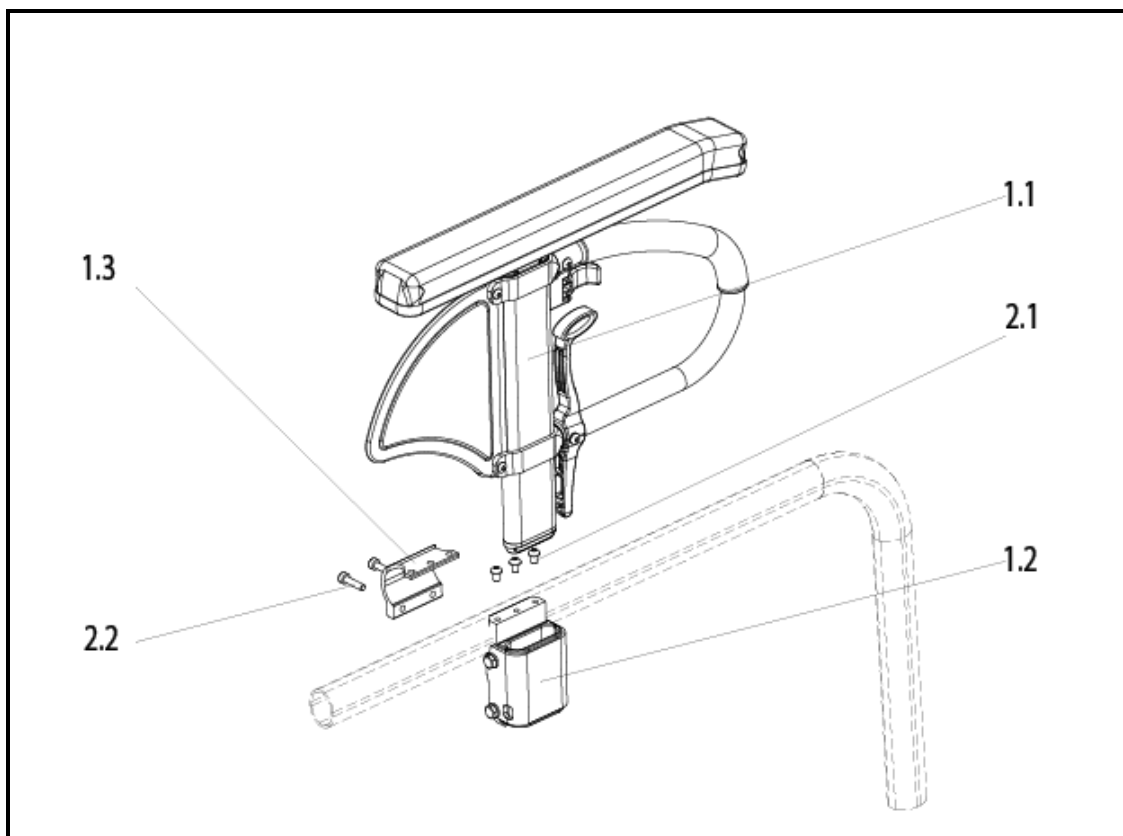


Monteringsanvisning

Brems - Helium

Brems Quickie Helium høy kompositt hø		000861260
Brems Quickie Helium høy kompositt ve		000761260

Bremsene kommer umontert (dersom de bestilles separat) og de monteres alle på samme måte på rammen med klemmer (2.2). Denne skrues fast med skruene (2.6 og 2.7). Klemmen festes på rammen i valgfri posisjon avhengig av drivhjulets posisjon. Finjustering av bremsen gjøres ved å løsne skruene (1.4) og flytte bremsen fremover eller bakover i sporet (2.1) deretter strammes skruene (1.4).

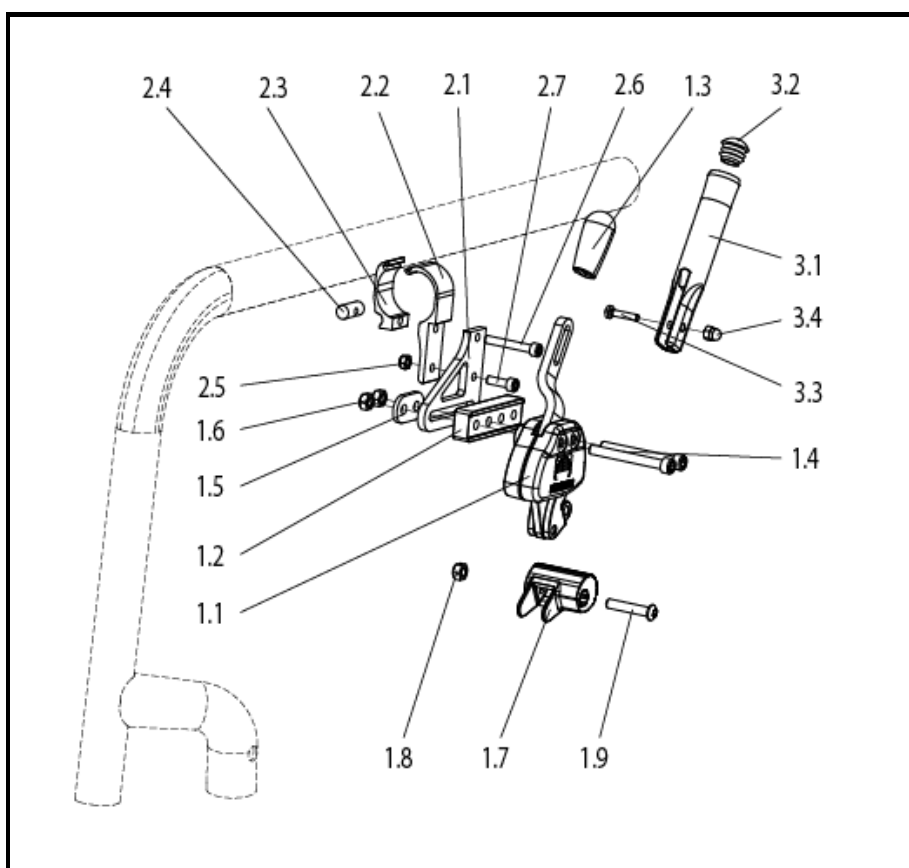


Monteringsanvisning

Drivhjul alle typer - Helium

Drivhjul 24" mrs Zippie/Quickie lettvekt m/hurtigkobling	152611	6880
--	--------	------

Drivhjulet monteres ved at knappen på quick release akselen (1.6) trykkes inn. Deretter stikkes akselen inn gjennom hjulets senter og inn i kambringshylsen som sitter på rullstolen. Kontroller at hjulet sitter fast ved å holde i navet og dra hjulet utover. Om hjulet skulle løsne ved denne test kan quick release akselens lengde justeres ved å skru på mutteren på akselen.

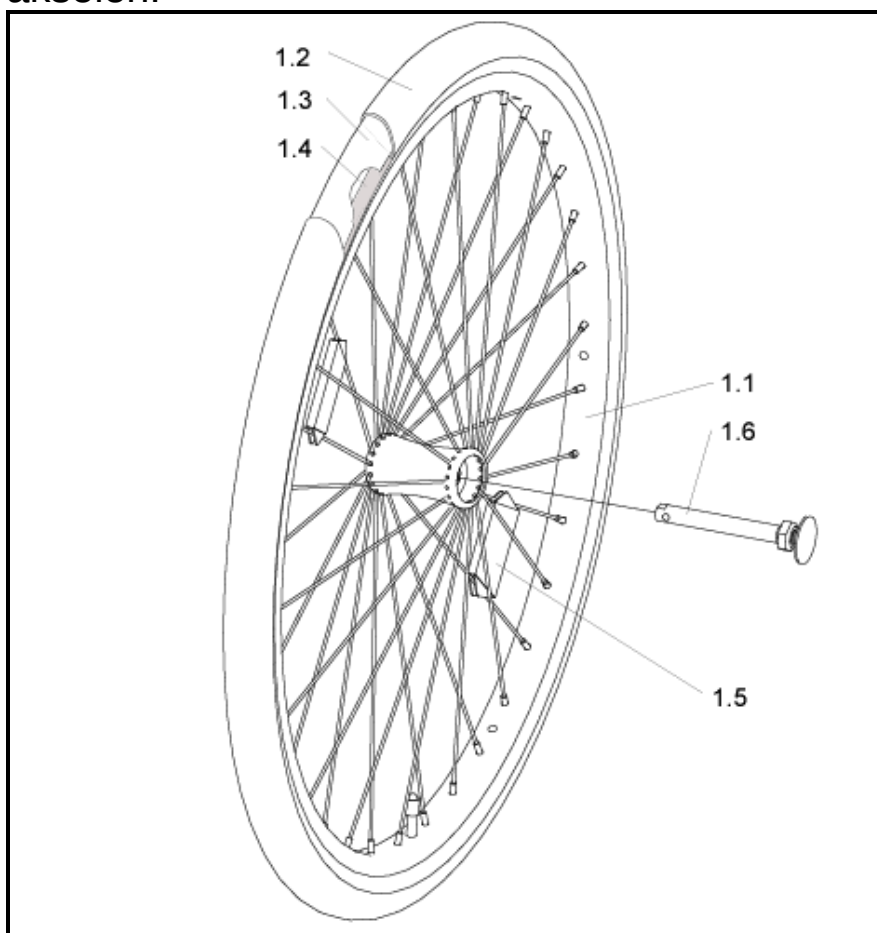

Monteringsanvisning

Drivring – Helium

Drivring mrs Quickie Helium/Helium lett 25" lettvekt	179966	066516-004
--	--------	------------


Drivringen monteres i felgen med hjelp av skruene (1). Disse skruene skrues fast i de 6 popmutterne som sitter i felgen.



Monteringsanvisning

Eikebeskytter - Helium

Eikebeskytter monteres med hjelp av de medfølgende svarte plaststifter. Legg eikebeskytteren mot hjulet og trykk de svarte plaststiftene gjennom hullene i siden mot en eike til de klikkes fast.

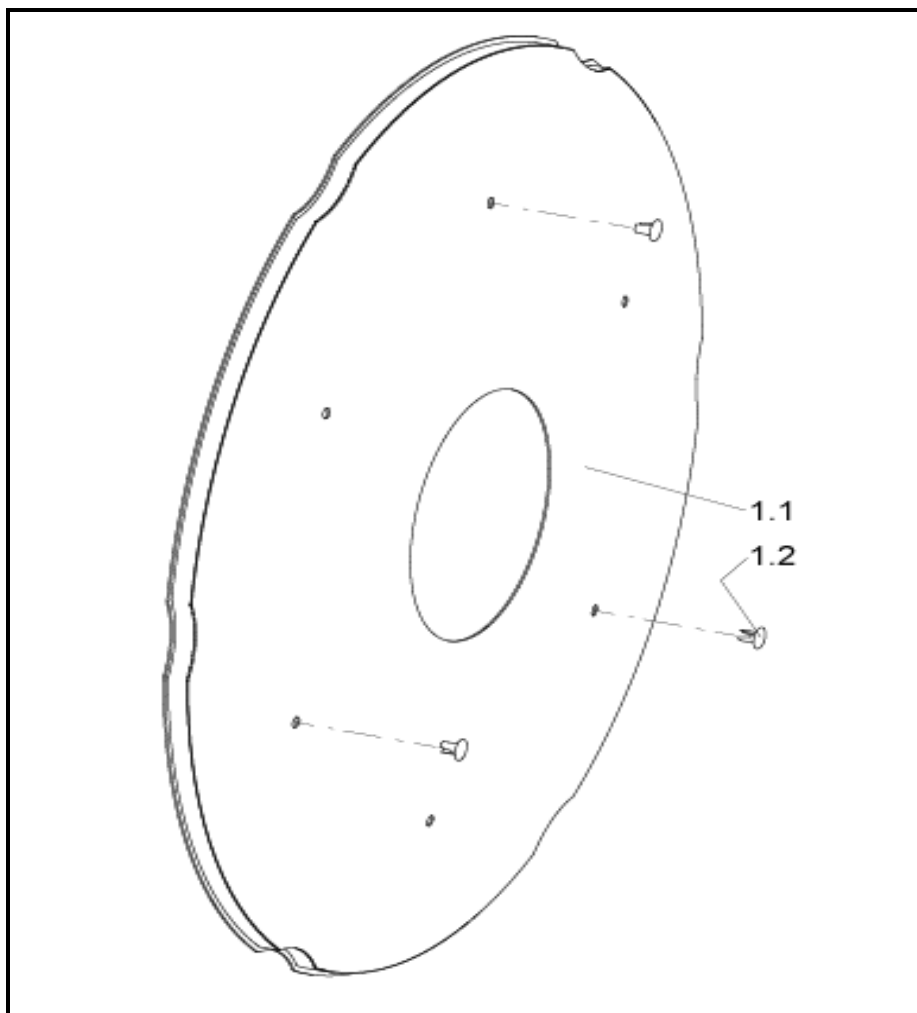

Monteringsanvisning


Fotbøyle og fotplate – Helium

Eksempel:

Fotplate mrs Quickie Helium/Helium lett rørmodell plate sb32	180193	066915-000-32
--	--------	---------------

Fotbøylene alternativt fotplatene kommer montert og monteres på stolen ved å stikke de inn i rammen nedenfra (store bildet). Deretter kan høyden stilles inn ved å skyve bøylene oppover eller nedover. Når riktig høyde er oppnådd skrus bøylene fast med skruene som sitter på baksiden av rammens rør (en på hver side).

Ved høytmontert fotplate (lille bildet) monteres fotplaten istedet i separate fester. Disse skrus fast i rammen i valgfri høyde med klemmen (3.1) og skruene (3.5) og (3.6).

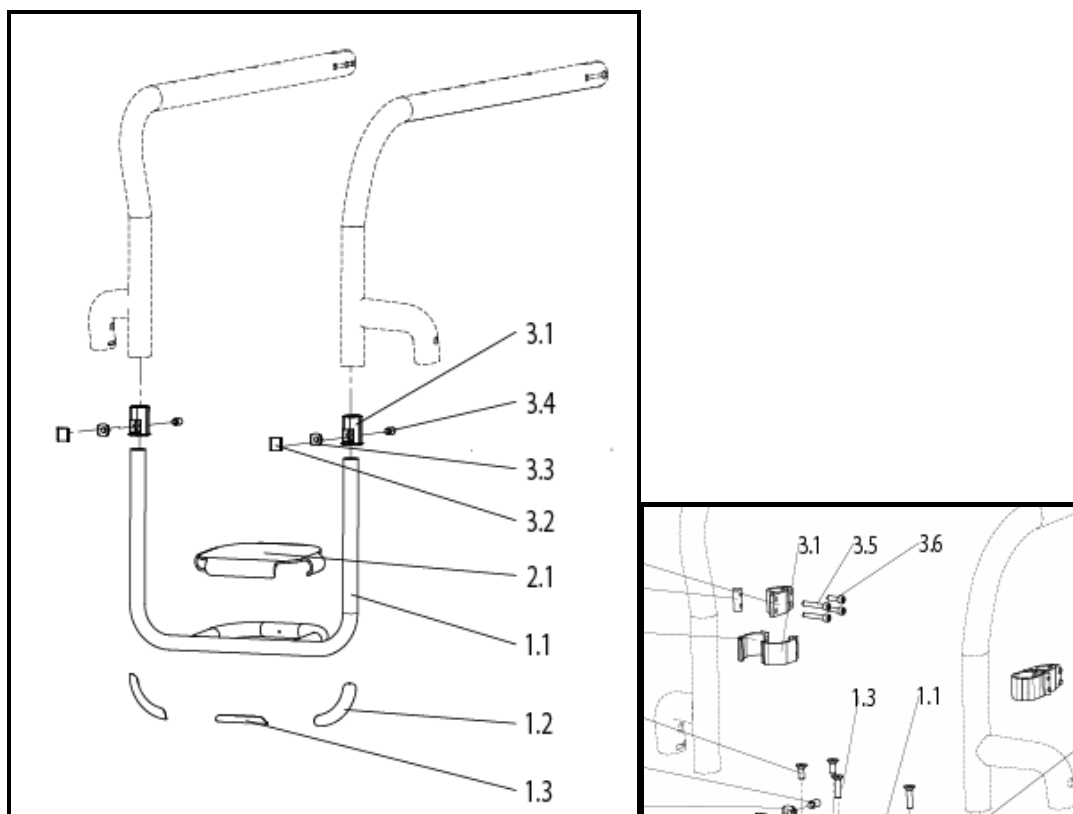


Monteringsanvisning

Fotfikseringsplater - Helium

Fotfiksering mrs Quickie Helium/Life/Zippie Simba sidestøtte fotplate hø/ve	152638	765821004
--	--------	-----------

Fotfiskeringsplater (2) monteres som vist på bildet i bak-kant av fotplaten. En på hver side. Det finnes forborede hull i fotplaten der de medfølgende skruene (1) skal monteres.

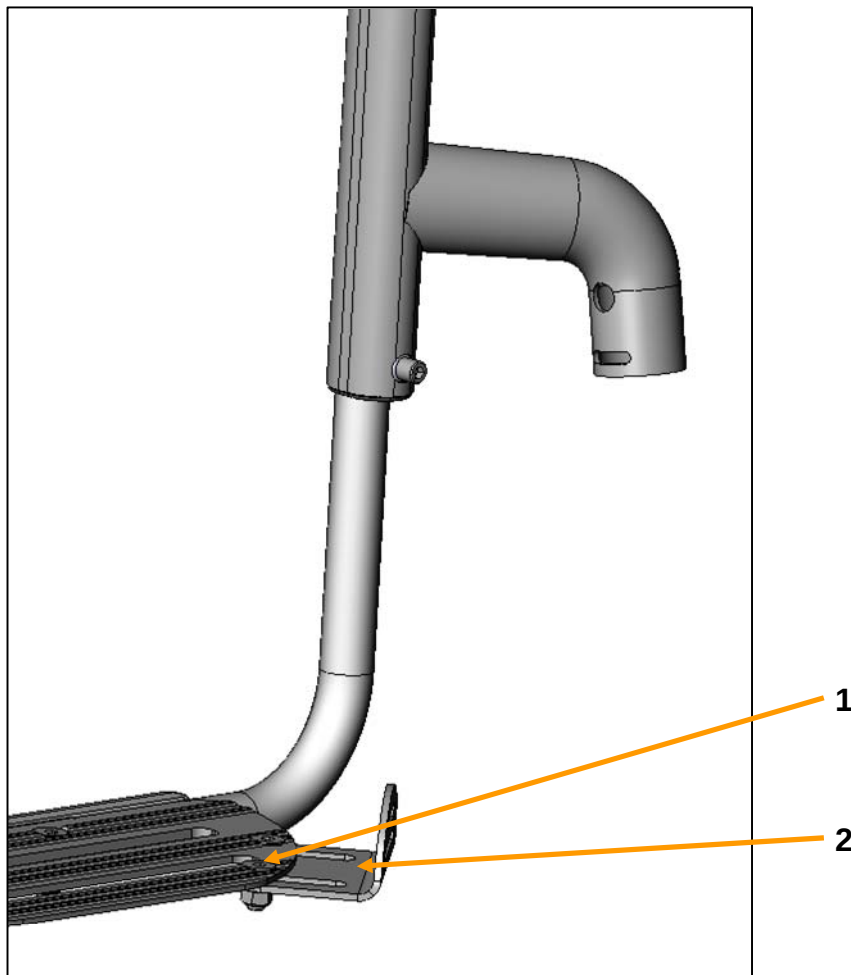

Monteringsanvisning


Hoftebelte - Helium

Belte hofte Cosycraft mrs Quickie/Zippie/Breezy CC 1,5" m/p	059430	450421
Belte hofte Cosycraft mrs Quickie/Zippie/Breezy CC 1,5" m/p	059505	450420
Belte hofte Cosycraft mrs Quickie/Zippie/Breezy CC 1,5" m/p	059506	450422
Belte hofte mrs Quickie/Zippie/Breezy fra sb40	179437	069935
Belte hofte mrs Quickie/Zippie/Breezy opptil sb40	179438	069939

Beltet monteres på valgfritt sted på rammen eller rygggrørene og festes ved at båndet tres rundt rammen. Plastspennene kan reguleres og holder båndet på plass.



Bilde 1 Rygggrørsmontert belte

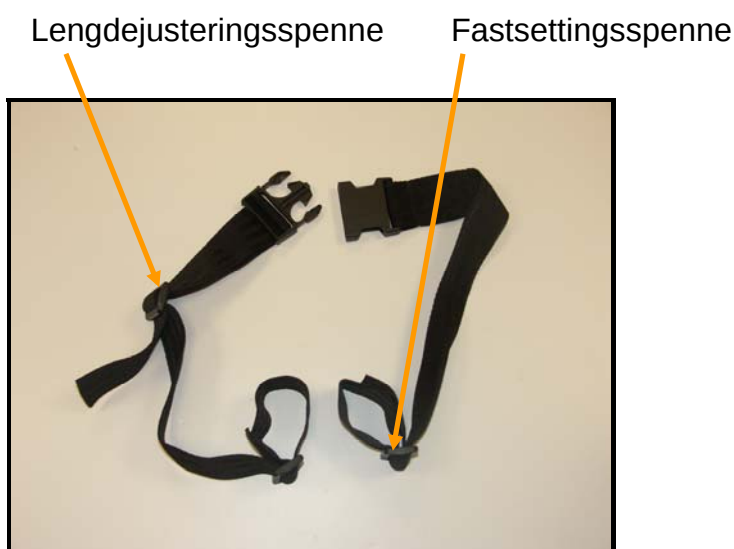


Bilde 2 Belte med spenner

Monteringsanvisning

Kambringshylse - Helium

Camberadapter mrs Quickie Helium 0°, 3°, 6°, 9°	164912,3,4,5	062503-001,2,3,4
---	--------------	------------------

Ta bort hjulet. Løsne skruen (1) fra undersiden. Dra deretter ut den eksisterende kambringshylsen (2) og erstatt den med den nye. Skru deretter fast skruen (1) igjen.


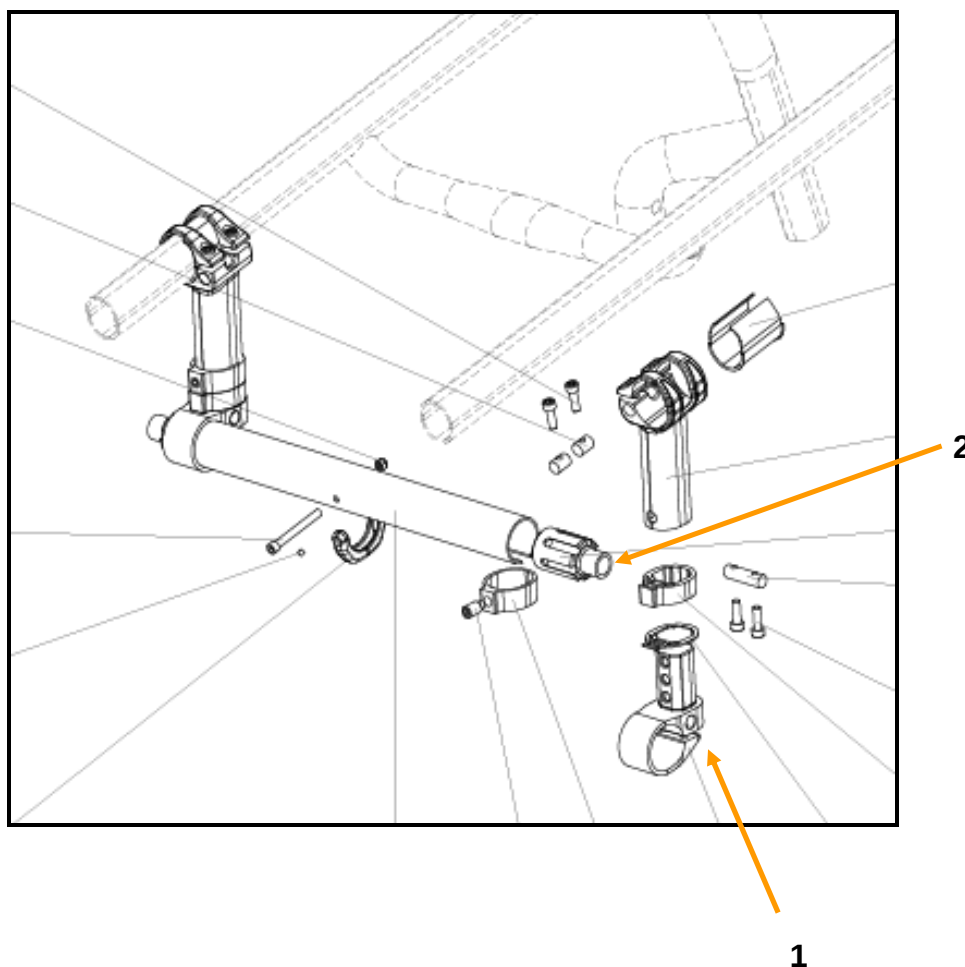


Monteringsanvisning

Kjørehåndtak – Helium

Kjørehåndtak mrs Quickie Helium/Helium Lett ryggrør kort	179750	066866-001
Kjørehåndtak mrs Quickie Helium/Helium Lett ryggrør	179751	066867-001
Kjørehåndtak mrs Quickie Helium/Helium Lett ryggrør nedfell	179752	066858-001-ET
Kjørehåndtak mrs Quickie Helium/Life hreg ryggr Jay	152652	051456

Kjørehåndtaket monteres ved at de stikes ned i toppen på ryggrammen. Deretter fikseres de til ønsket høyde fra siden med to skruer. Bakomliggende kjørehåndtak monteres gjennom at festet (3.1 nedre bildet) monteres på (4.1 øvre bildet).

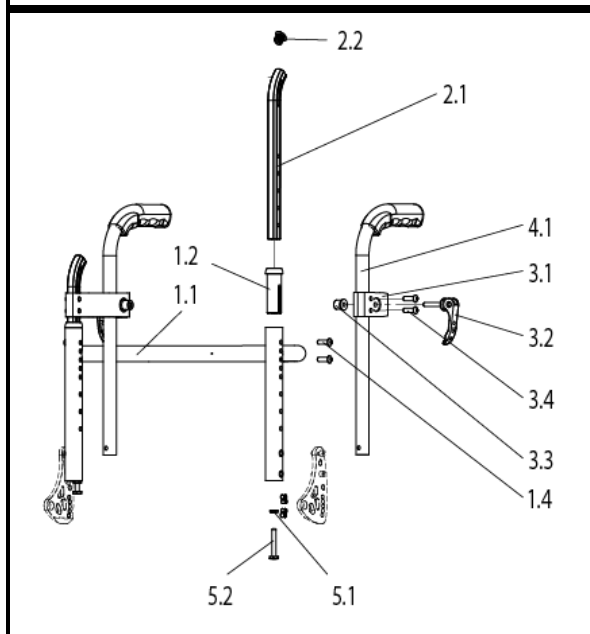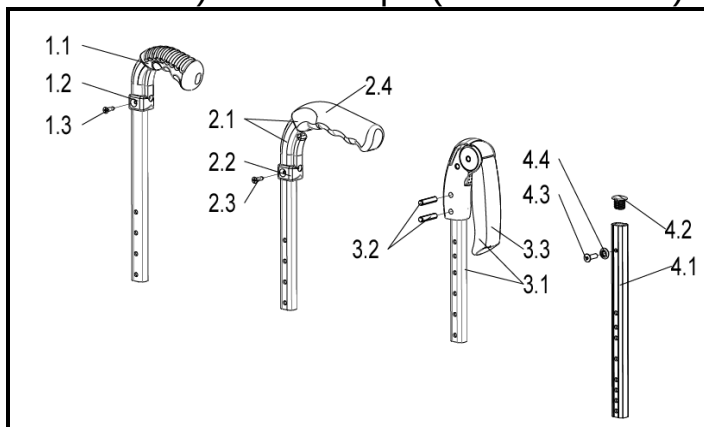

Monteringsanvisning


Klesbeskytter i aluminium og karbon - Helium

Klesbeskytter mrs Quickie Helium skjerm alu hø	180207	066933-002
Klesbeskytter mrs Quickie Helium rett alu hø	180209	066934-002
Klesbeskytter mrs Quickie Helium skjerm karbon hø	180211	066935-002
Klesbeskytter mrs Quickie Helium lettvekt hø slim style	180213	066937-002

Klesbeskytteren monteres i et valgfritt hull på ryggrøret. Hvilket hull som velges kommer an på hvor man ønsker å ha klesbeskytteren i forhold til hjulet. Før skruen (5.5) igjennom den svarte kon-formede plastpakningen (ca 3mm tykk) og så den hvit pakningen (5.3.1). Deretter føres skruen gjennom sporet i klesbeskytteren. På innsiden av klesbeskytteren tres deretter ytterligere en hvit pakning av typen (5.3.1) og deretter kommer den svarte skålformede avstandsstykket (5.2). Denne legges med den skålformede siden mot ryggrøret. Skruen går så igjennom ryggrøret og låses fast med mutteren (5.9). På mutteren trykkes om ønskelig en plathylse.

I nederkant monteres klesbeskytteren gjennom at staget (5.1) føres inn i sporet i braketten og spennes fast med de to unbraco-skruene (5.4) som vist på bildet. Før deretter skruen 5.6 gjennom metallpakningen (5.8) og deretter plastpakningen (5.3.1) (OBS vises ikke på bildet) velg deretter et av hullene i klesbeskytteren. På innsiden av klesbeskytteren tres så ytterligere en hvit pakning av typen (5.3.1) og deretter går skruen gjennom staget (5.1). Pakningen (5.3) behøver ikke brukes. Lås fast skruen gjennom å dra til mutteren (5.9) på baksiden av staget (5.1).

Bilde 1

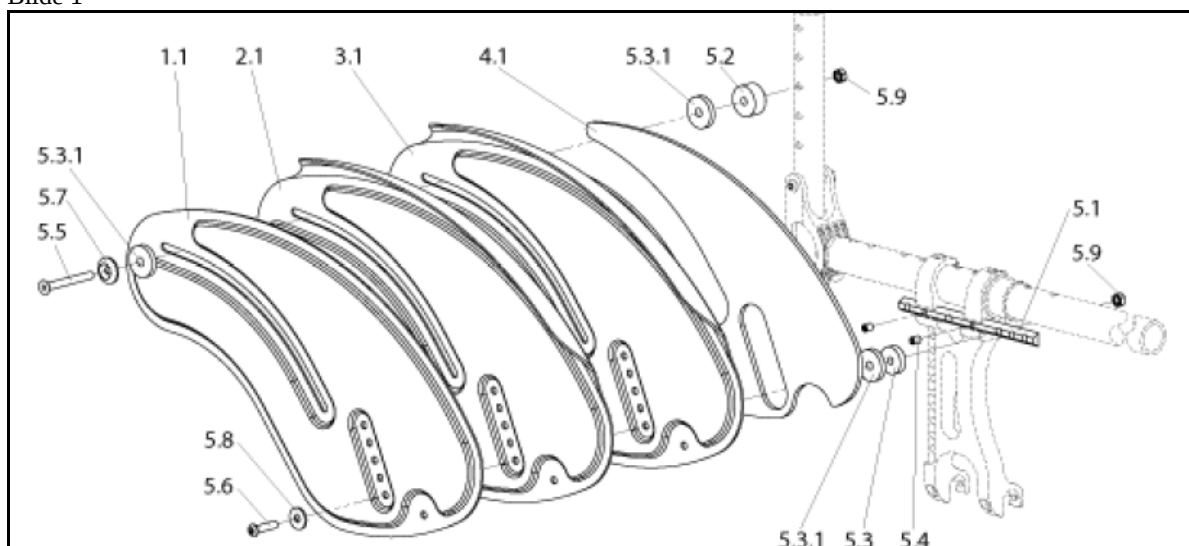

Monteringsanvisning


Klesbeskytter kompositt, avtakbart - Helium

Klesbeskytter Quickie Helium avtag kompositt hø ve

180190

066859-001

Monter klesbeskytterfestet på rammen i henhold til bildet. Holderen der klesbeskytteren skal settes i skal være på utsiden av rammen. Da rullestolen er utrustet med fast setetrekk kan skinnen som denne er festet i behøve å løsnes noe. Dette for å kunne få inn festet på den tiltenkte plassen. Festet monteres fast med skruene 2.2 (se bilde). Deretter monteres klesbeskytteren ved at den stikkes ned i holderen.

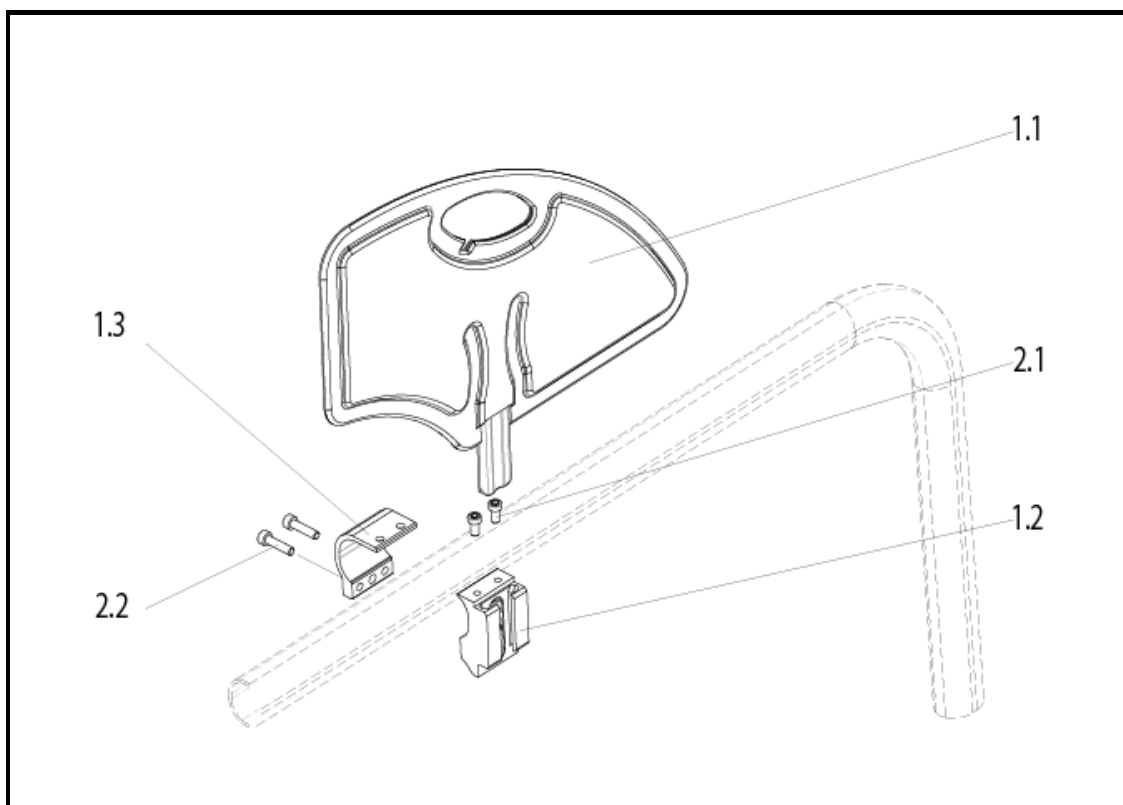

Monteringsanvisning

Koffertholder - Helium

Koffertholder Caddy mrs Quickie/Zippie/Breezy	098543	L902350
---	--------	---------

Koffertholderen monteres med de medfølgende skruene. De plasseres på fotbøylen som vist på bildet nedenfor. Koffertholderen felles ned når den skal benyttes.




Monteringsanvisning

Kompaktbrems - Helium

Brems mrs Quickie Helium/Helium lett Compact m/klemme hø	180205	066932-002
--	--------	------------

Bremsen monteres med klemmen (2.1) som skrues fast med skruene (2.5). Klemmen festes på rammen i valgfri posisjon avhengig av drivhjulets posisjon. Finjustering av bremsen gjøres ved å løsne skruene (2.6) og flytte bremsen (1) framover eller bakover hvorefter skruene (2.6) dras til.

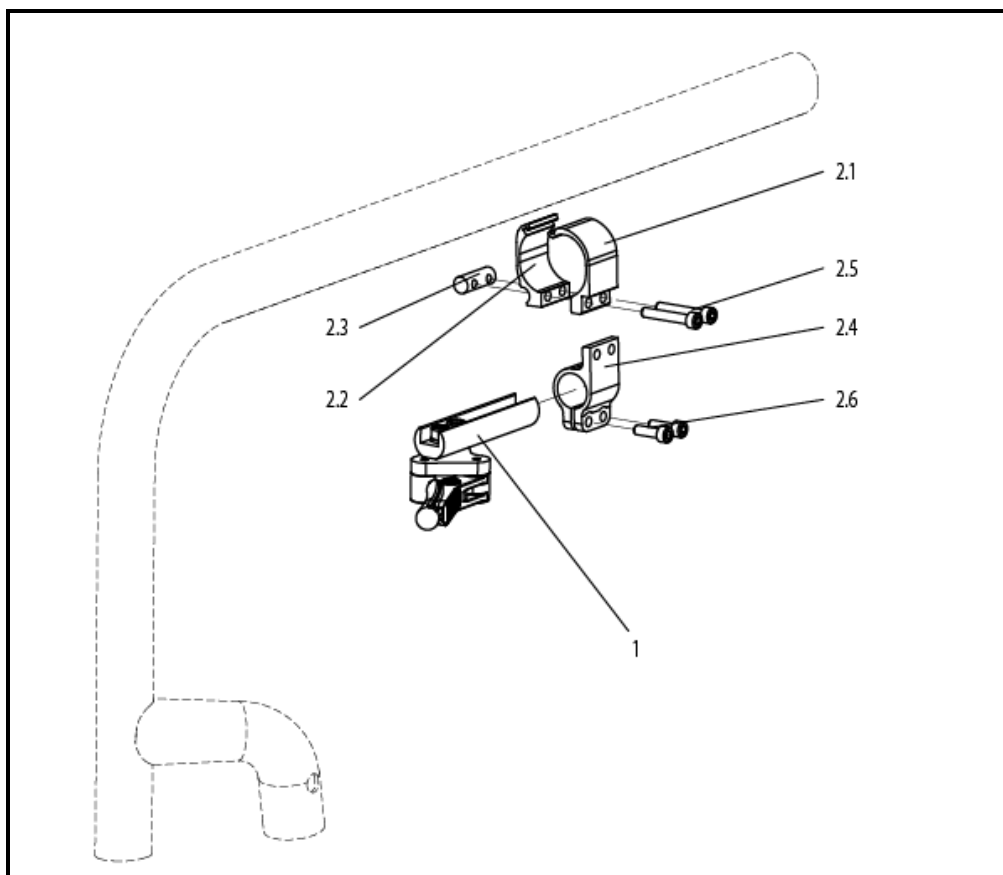


Monteringsanvisning

Kompaktbrems lettvekt - Helium

Brems mrs Quickie Helium/Helium lett lettvekt hø	179990	066600-102
Brems mrs Quickie Helium/Helium lett lettvekt frontmontert hø	179992	066600-202

Bremsen monteres fra undersiden med skruene (4) alternativt (6) (avhengig på bremstype). I rammen finnes 3 popmuttere montert til dette formål. Velg hvilke muttere som skal benyttes, avhengig av drivhjulets posisjon. Distansestykkene (7) legges mellom rammen og bremsen.

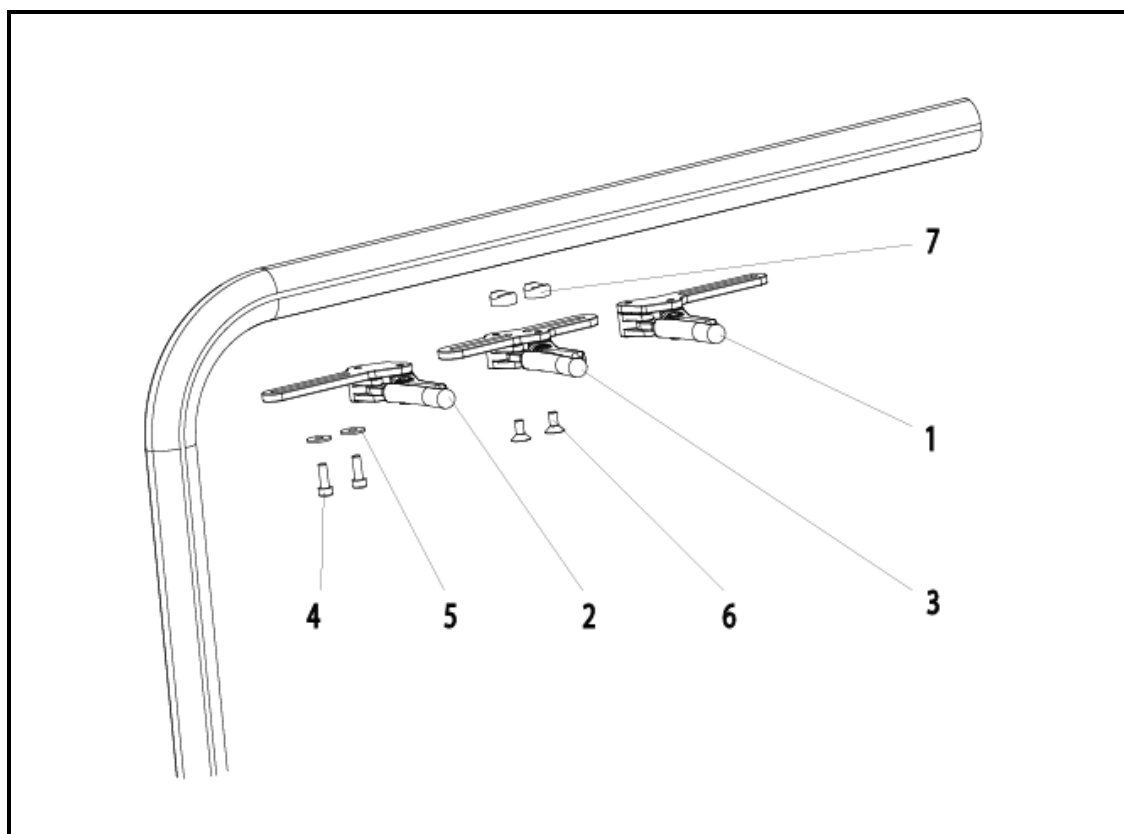


Monteringsanvisning

Krykkeholder - Helium

Vipperør mrs Quickie Helium/Helium lett kort hø	180009	066741-002
Krykkeholder mrs Quickie Helium/Life/Youngster3/Zippie Simba	139035	740815120

Krykkeholder (1.1) monteres på vipperøret med en skrue i bunnen. Vipperøret monteres i sin tur i holderen (1) med skrue (2). Borrelåsbåndet (1.2) monteres på ryggrøret ved hjelp av skruen for rygghøydejustering.

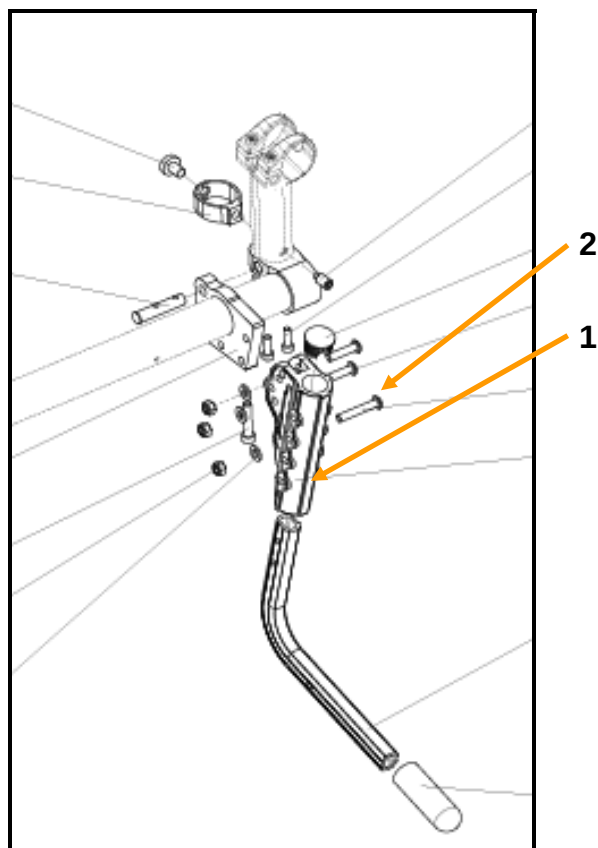


Monteringsanvisning

Leggbånd - Helium

Leggbånd mrs Quickie Helium/Helium lett 75	179785	066140-001
Leggbånd mrs Quickie Helium/Helium lett 80	179786	066140-002
Leggbånd mrs Quickie Helium/Helium lett 85	179787	066140-003
Leggbånd mrs Quickie Helium/Helium lett 90	179788	066140-004

Leggbåndet (2) monteres fast mot borrelåsen som sitter på rammen slik som bildet viser. Legg leggbåndet mot borrelåsen i ønsket posisjon slik at brukeren får riktig posisjon i forhold til fotplaten. Trekk deretter leggbåndet rundt remmerøret og fest det på baksiden.

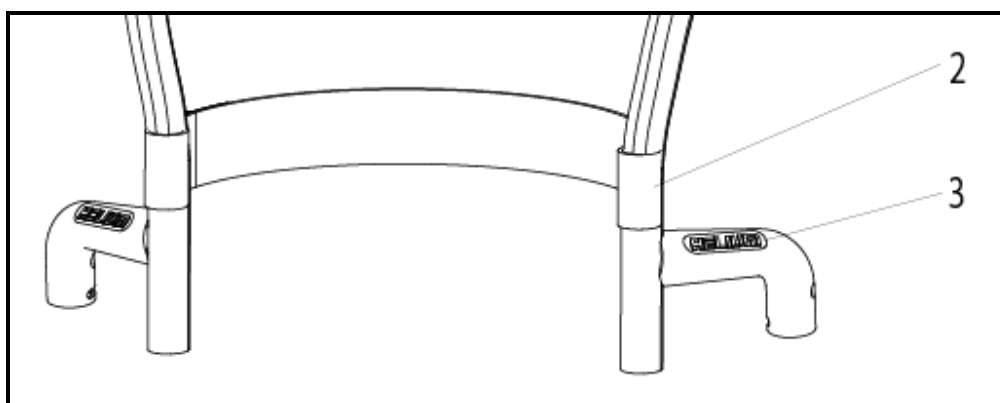

Monteringsanvisning

Rammebeskytter/Frontbeskytter - Helium

Rammebeskytter mrs Quickie Helium avtag	152670	051186
Rammebeskytter mrs Quickie Helium/Helium lett front neopren avtag	152671	750316

Rammebeskyttere monteres på valgfritt sted på rammen (oftest ved knevinkelen). Det settes fast rundt rammen med de isydde borrelåsbåndene.



Monteringsanvisning

Ryggtrekk - Helium

Rygg Quickie Helium lett Lettvekt sb40 rh40-45		066805-4040
Rygg Quickie Helium Nylon sb40 rh40-45		066804-4040
Rygg mrs Quickie Helium/Helium Lett Comfort sb40 rh25	180146	066807-14025

Dette er eksempler. Det finnes et art.nr til hver størrelse.

Ryggtrekk monteres ved å tre ryggbåndene (1) på ryggørerne som vist på bilde. Det øverste båndet festes i de to krokene som sitter bak på ryggørerne. Disse krokene hindrer ryggbåndet i å gli ned ved belastning.

Deretter legges ryggtrekket (2) mot forsiden av båndene og trekkes rundt over det øverste båndet slik at trekket sitter som vist på det høyre bildet.

Lettvektsryggens bånd ser litt annerledes ut og i stedet for å tre disse på ryggørerne legges de rundt rørene og festes mot de på ryggørernes festede borrelåsbånd.




Monteringsanvisning

Setetrekk fast - Helium

Trekk sete Quickie Helium sb40 sd40 lomme		066324-4040	4040=sbsd
---	--	-------------	-----------

Dette er eksempel. Det finnes et art.nr til hver størrelse.

Træ skinnene (2.1) gjennom setetrekket og skru dem deretter fast med skruene (2.4).

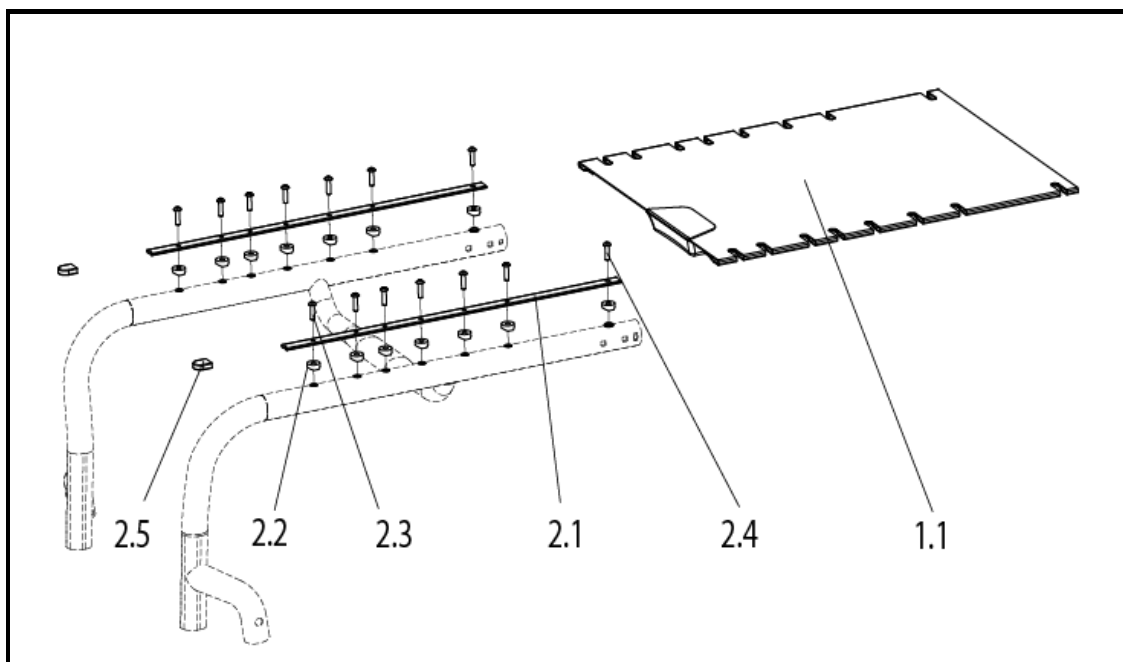


Monteringsanvisning

Svinghjul - Helium

Svinghjul 5" mrs Quickie Helium/Helium Lett kompakt alu	194672	066546	Mange modeller
---	--------	--------	----------------

Svinghjulene monteres i gaffelen ved at den gjengede pinnen (2.2) skrus fast i en av hylsene (2.4). Denne føres deretter inn gjennom valgfritt gaffelhull og siden gjennom distansestykket (2.5) og deretter kommer svinghjulet. Monter den gjenværende hylsen på tilsvarende måte fra andre siden og skru til hylsene med hjelp av to 4mm unbrakonøkler. Hold imot med den ene på ene siden og skru med den andre på den andre siden. De sentreres automatisk. Kontroller at svinghjulet snurrer lett og uten motstand.

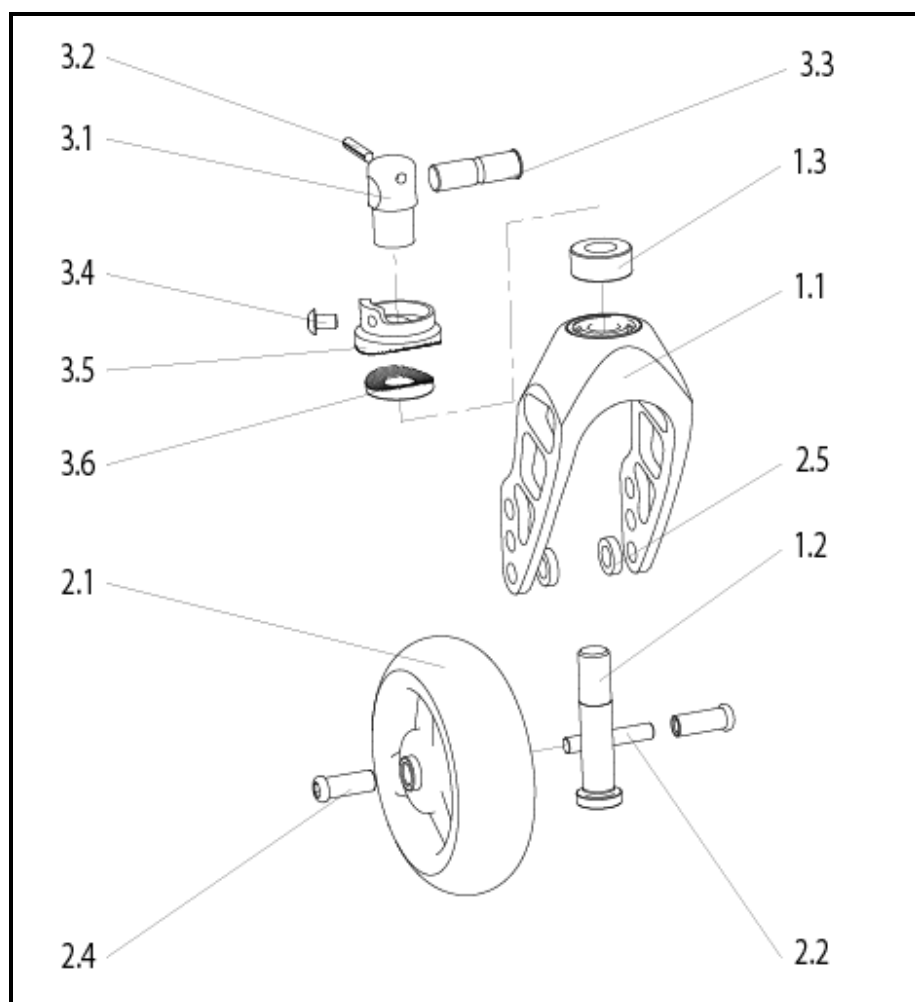


Monteringsanvisning

Tippesikring avtagbar - Helium

Tippesikring mrs Quickie Helium/Helium lett rørmodell hø uten feste kort COG	176409	066736-002	001 er venstre
--	--------	------------	----------------

Tippesikringer (1.1) monteres i holderen (2.1) som vist på bildet. Ved montering, trykk inn den bakre fjærende knappen på tippesikringen og før den inn i holderen. Slipp den bakre knappen når den fremre befinner seg i holderen. Beveg tippesikringen litt fremover og bakover til den fremre knappen kommer ut i holderens bakre hull. Observer at den bakre knappen alltid skal være igjen utenfor holderen slik at tippesikringen enkelt kan tas av igjen.

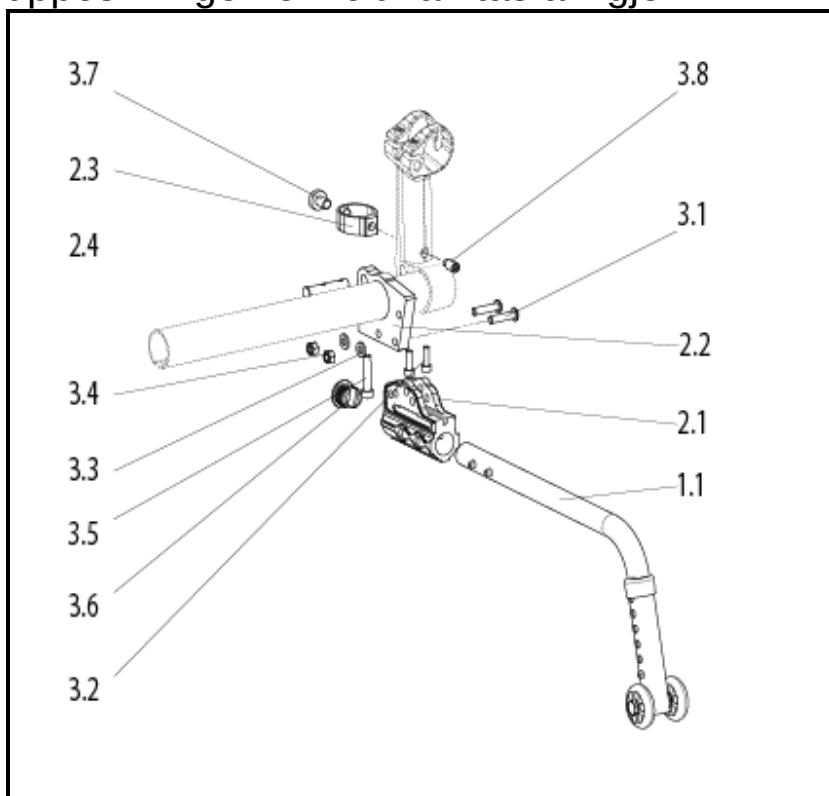


Monteringsanvisning

Tippesikring SA - Helium

Tippesikring mrs Quickie Helium/Helium lett innsvingbar hø	180002	066737-002	001 er venstre
--	--------	------------	----------------

Stikk inn fjæren fra undersiden i holderen (2.1). Sett inn bolten (3.1) i valgfritt hull i holderen og deretter gjennom fjæras lukkede sløyfe. Skru den fast sammen med pakningen og mutteren (3.3). Brett en snor dobbelt og trø den inn fra undersiden gjennom tippesikringen (1.2) med den doble delen oppover. La endene henge ut nedenfor tippesikringen. Hekt på fjæren på snoren og stikk den inn (1.2) i (2.1). Dra deretter i begge endene i snoren til fjæra kommer ut i bunnen på (1.2). Hekt fast stopp-pakningen (1.4) i enden på fjæra og slipp alt. Dra så i den ene enden av snoren til hele snoren løsner fra tippesikringen.

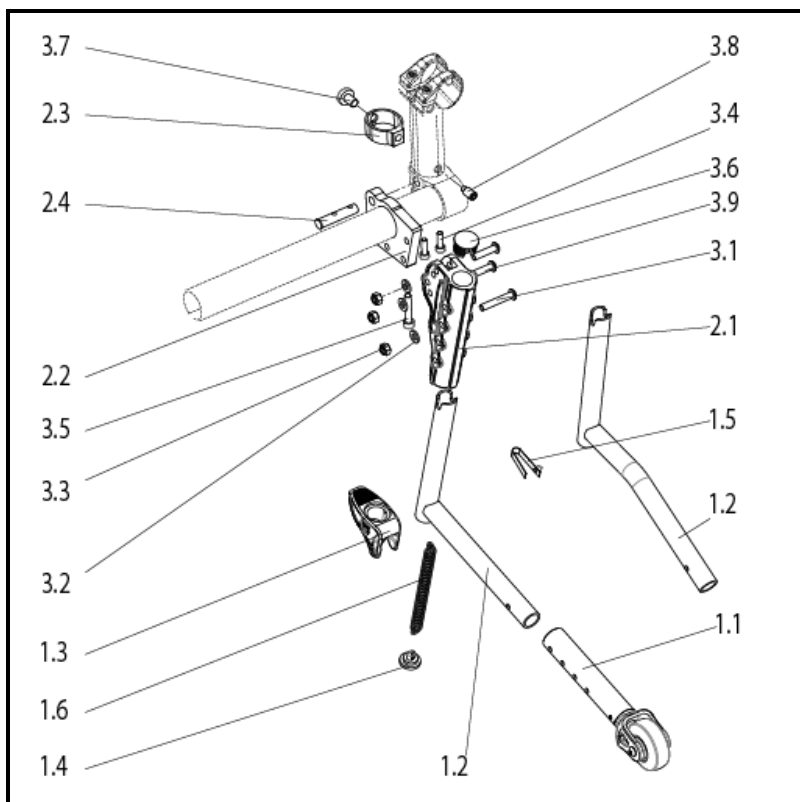

Monteringsanvisning

Transportfeste - Helium

Transportfeste mrs Quickie Helium		066772
-----------------------------------	--	--------

Transportfestet monteres ved at bolten (1) byttes ut mot den medfølgende forsterkede og forlengede bolten. Transportfestet (2) monteres deretter på innsiden av rammen slik bildet viser.

