



Innovatives Sitzsystem bestehend aus zwei Bezügen


Für mehr Schutz und einen optimalen Wärme- und Feuchtigkeitstransport besteht das JAY Balance Kissen aus einem inneren, wasserundurchlässigen Bezug sowie aus einem äußeren mikroklimatischen Bezug. Wahlweise kann auch ein Stretchbezug oder Inkontinenzbezug bestellt werden.

Hygiene+ : Der innere Kissenbezug ist abwaschbar. Wasserundurchlässige Nähte sowie der patentierte Aquaguard™ Reißverschluss sorgen dafür, dass die Schaumstoffbasis des Kissens dabei auch wirklich trocken bleibt. Der äußere Kissenbezug kann bei 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden.





Technische Daten

Kissenbreite	340 mm – 600 mm, mit Cryo®Fluid ab 360 mm	
Kissentiefe	340 mm – 600 mm, mit Cryo®Fluid ab 360 mm	
Kissenhöhe	75 mm	
Kissengewicht	2,4 kg (400 x 460 mm mit Fluideinlage, 3 kg mit Cryo®Fluid) 1,9 kg (400 x 460 mm mit Lufteinlage)	
Max. Nutzergewicht	150 kg (Breiten: 340 mm – 500 mm); 225 kg (Breiten: 560 mm – 600 mm)	
Kissenmaterial	Basis: Kaltschaum, Einlage: Cryo®Fluid, Flow Fluid, Luft	
Äußerer Kissenbezug	Mikroklimatisch, Stretch, Inkontinenz	
Innerer Kissenbezug	Wasserundurchlässig	
Besonderheiten	Inkontinenzschutz, abwaschbarer Innenbezug, Außenbezug  , zus. Positionierung möglich	
Einsatz	Dekubitusrisiko: sehr hoch; sensorisches Empfinden stark bis vollkommen herabgesetzt	
Garantie	Kissen 2 Jahre, Bezug 6 Monate	
Hilfsmittelverzeichnis Pos.Nr.	Fluid: 11.39.04.2012	Luft: 11.39.03.5005



Für weitere Informationen sehen Sie bitte die Gebrauchsanweisung auf unserer Internetseite. Fragen beantwortet Ihnen auch gerne der Sunrise Medical Kundenservice. Diese Unterlage können Sie auch unter www.SunriseMedical.de im PDF-Format in größerer Schrift ansehen.



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

JAY BALANCE

Perfekter Hautschutz und maximale Stabilität



Neue Größen

CRYO FLUID

Die perfekte BALANCE aus Hautschutz und Stabilität

Gesundes Sitzen

Anatomisch geformt für eine optimale Druckentlastung und -verteilung, Sitzstabilität und hohe Sitztoleranz sorgt das neue JAY Balance Kissen für eine ideale Entlastung der Sitzbeinhöcker sowie für eine hohe Reduktion der hier entstehenden Scherkräfte.


Das JAY Balance besteht aus einer Basisschale aus verschiedenen Schaumschichten. Die geformte Mulde im Beckenbereich kann wahlweise mit Fluid- oder Lufteinlage gefüllt werden und sorgt für ein tieferes Einsinken der Sitzbeinhöcker. Das Kissen ist standardmäßig mit einem wasserresistenten Inkontinenz Innenbezug ausgestattet, der die Basis vor Verunreinigung schützt und jederzeit abgewaschen werden kann. Beim äußeren Kissenbezug kann wahlweise ein mikroklimatisches, Stretch- oder Inkontinenz-Material gewählt werden. Für eine gezielte Führung der Beine ist zusätzlich ein Positionierungsset erhältlich.





Die mehrlagige Basisschale

Die anatomisch geformte Schaumstoffbasis des JAY Balance besteht aus einem mehrlagigen geschlossenen Kaltschaum, der sich sehr gut an die Körperkonturen anpasst. Die Beckenaussparung im hinteren Bereich ist rundum geschlossen und verhindert damit die Migration des Fluids nach außen. Sie sorgt gleichzeitig für eine behutsame Abstützung der Trochanter und des hinteren Beckens.

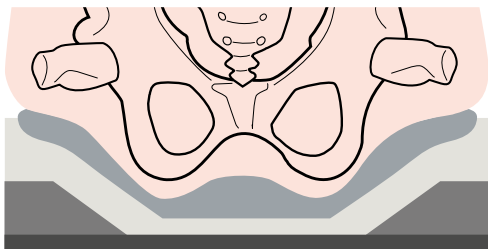

Die Beckenaussparung ist der Größe des jeweiligen Kissens angepasst, so dass der Nutzer stabil in der für ihn optimalen Position sitzt und der Druck gleichmäßig verteilt wird. Die Oberschenkel werden seitlich gestützt und geführt. So kann eine gute Stabilisierung des Beckens und ein hoher Sitzkomfort erreicht werden, was insbesondere bei langfristiger Nutzung über mehrere Stunden von großer Bedeutung ist.



Die Kisseinlagen

Die Einlagen sind die Kernstücke des JAY Balance. Sie nehmen die hervorstehenden knöchernen Bereiche des Beckens auf und passen sich ihnen ohne Gegendruck an. Darüber hinaus wird der Druck über die gesamte Kontaktfläche verteilt, wodurch Sitzdruckpunkte und Scherkräfte minimiert werden.

Das JAY Balance Kissen kann mit **JAY Cryo® Fluid**, **JAY Flow Fluid** oder mit **Luftinlagen** bestellt werden. Fluideinlagen haben die Eigenschaft, dass sie sich der Form des Körpers annehmen und damit den Druck gleichmäßig über den gesamten Kontaktbereich verteilen. Das Fluid umfließt dabei die Sitzbeinhöcker und Trochanter und vermeidet so Gegendruck. Luftinlagen bieten vergleichbare Vorteile, sind jedoch wartungsintensiver und erfordern Erfahrung. Bei Luftinlagen verringert sich das Kissengesamtgewicht.



Das Cryo Fluid ist ein patentiertes revolutionäres Material, das die sitzende Hautoberfläche eines Patienten bis zu 8 Stunden lang aktiv kühlt und dabei den Druck gleichmäßig verteilt, die Scherkräfte verringert und das Feuchtigkeitsrisiko senkt.



Die wartungsfreie Konstruktion der Fluideinlage (dargestellt JAY Flow Fluid) sorgt für eine längere Lebensdauer des Kissens.



Die Luftmenge kann zur Anpassung vor Ort abgestimmt werden. Als Ein- und Zwei-Kammer-System erhältlich.



Die Positionierungskeile

Die Positionierungskeile sind optional erhältlich. Sie ermöglichen eine gezielte Führung und eine an den Nutzer angepasste Positionierung der Oberschenkel. Das Positionierungsset besteht aus fünf Keilen und einem passenden Bezug mit Taschen, die die Positionierungskeile aufnehmen. Dieser kann gesondert bestellt werden.