

Apoios de cabeça Whitmyer



Índice

1. Características dos apoios de cabeça WHITMYER 4

2. Guia de utilização para apoios de cabeça WHITMYER 5

3. Componentes dos apoios de Cabeça WHITMYER 6

• Almofadas

PLUSH E PLUSH AJUSTÁVEL

Apoios de cabeça de uma peça que proporciona um suporte occipital seguro e muito confortável.



7-8

CONTOUR CRADLE e C-PLUSH

Apoios de cabeça de 1 peça para suporte sub-occipital, occipital e lateral. Ideal em cadeiras reclináveis e basculantes



9

SOFT 2 peças

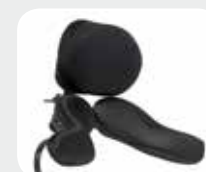
Excelente suporte occipital e suboccipital. Ideal para assimetrias laterais moderadas.



10-11

SOFT 3 peças


Ideal para posicionamentos de cabeça mais desafiantes.



12-13

Apoios de Cabeça Heads Up

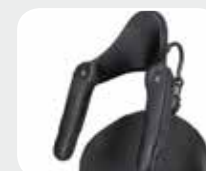Ótimo posicionamento da cabeça. Estabilidade anterior e lateral de ombros e tronco



14

Apoios de Cabeça Atenção Precoce

Excelente suporte para crianças



15





• Braços de montagem Whitmyer	16
Braços de montagem AXYS	17
Braços de montagem LINX	18
Braços de montagem PRO	19
Braços de montagem COBRA	20
Braços de montagem COBRA rebatível	21
• Suportes Latero-Faciais	22
• Suportes Anteriores	23
4. Acessórios e soluções Personalizadas	24

Características dos apoios de cabeça Whitmyer

Cada componente dos Apoios de Cabeça Whitmyer está desenhado para dirigir-se a um propósito de suporte específico.

Almofada Occipital:

Proporciona suporte posterior ao occipital

Almofadas sub-occipitais:

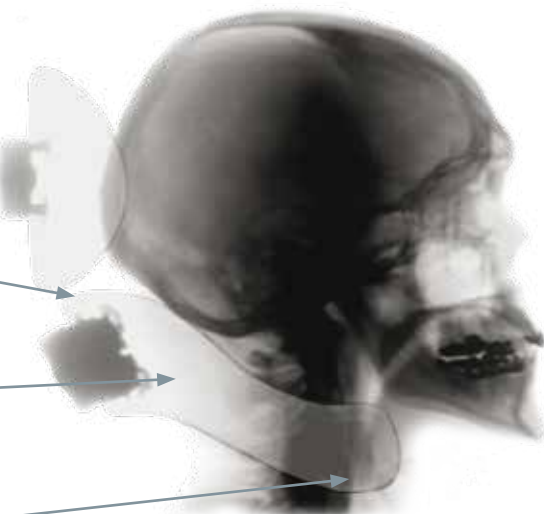
Fornecem estabilidade proximal à cabeça

Desenho lateral das Almofadas Sub-occipitais:

Proporcionam suporte lateral à coluna cervical;
Atenção: nunca à mandíbula!

Cantos Arredondados:

Proporcionam protecção e segurança ao paciente



■ Grande variedade de formas e tamanhos:

Os sistemas de apenas uma peça proporcionam o suporte básico necessário contra a gravidade. Suporte e conforto para uma óptima função.

Os sistemas de duas peças proporcionam suporte látero-proximal cervical assim como, suporte occipital posterior. Múltiplos e fáceis ajustes

Os sistemas de três peças são indicados para pacientes com necessidades de posicionamento de cabeça complexos e mais agressivos.

■ As diferentes opções de braços de montagem

proporcionam uma ampla gama de ajustes e possibilidades de posicionamento. Todos os braços de montagem estão desenhados para serem duradouros e resistentes.

■ As opções de montagem rebatíveis estão desenhadas para poder retirar o apoio de cabeça e seus acessórios quando for necessário, facilitando assim, as transferências do paciente.

■ Os componentes acessórios estão desenhados para proporcionar Suporte Anterior e/ou Lateral para as necessidades de posicionamento mais complexas.

■ As placas de montagem permitem uma fácil integração de todos os componentes acessórios com os sistemas de uma peça de almofada.

■ A opção Gel nos sistemas das almofadas combina propriedades anti-fricção, com uma fluidez de movimento não encontradas nas de espuma.

■ A opção de três fundas diferentes para o sistema de almofadas permite-nos eleger a solução mais adequada para as necessidades clínicas do nosso paciente.



Fixe objectivos realistas

O suporte de coluna cervical e cabeça é uma parte integral do posicionamento global do paciente na cadeira de rodas, não um acessório.

Por isso, posicione o seu paciente seguindo a ordem recomendada para estes pacientes em sedestação e realize a avaliação do suporte de cabeça apenas quando o paciente estiver optimamente posicionado em pélvica, extremidades inferiores e tronco.

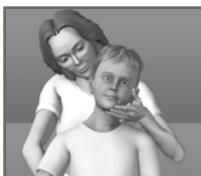
Fixe objectivos realistas de sedestação e posicionamento, utilize os produtos DEMO para ajudar a determinar o produto mais indicado para as necessidades clínicas do seu paciente. Desta forma, trabalhará de uma maneira profissional e alcançará os seus objectivos.



Avaliação Integral

Determine as necessidades de suporte do seu paciente realizando previamente uma avaliação completa, deitado e em sedestação. Feito isto, avalie o seguinte para determinar a quantidade de suporte que necessita para a cabeça:

- Flexão lateral e rotação
- Força/ debilidade muscular
- Padrões de tom
- Quantidade de força necessária para acomodar/ corrigir deformidades
- Tolerância ao tacto ou pressão



Mãos para cima!

Simule a posição ideal para a cabeça do seu paciente com as suas mãos. Avalie a força necessária para obter o posicionamento óptimo da coluna cervical e cabeça.

Tenha em conta a direcção e a quantidade de força exercida pelas suas mãos, assim como o movimento activo ou resistência que opõe o paciente.

Tenha também em conta o tamanho e a forma da cabeça do paciente, assim como, a superfície de contacto necessária para uma boa distribuição da pressão.



Seleccione os componentes adequados para o Apoio de Cabeça

Seleccione o suporte de cabeça, assim como, as opções e acessórios que melhor imitam a força e a forma das suas mãos durante a avaliação da cabeça do paciente. Considere quais e quantas superfícies de suporte necessita:

- Uma, duas, três ou mais almofadas de suporte posterior?
- Opções de suporte laterofacial e/ou anterior?
- Correção/ Acomodação de padrões laterais ou rotação da cabeça?
- Suporte Anterior: Dinâmico ou estático?



Zonas de contacto contra-indicadas

Por favor, evite a pressão directa dos componentes do apoio de cabeça sobre estes pontos de risco:

- Zona temporal do crânio
- Apófise mastóide (proeminência óssea detrás do ouvido)
- Olhos, ouvidos
- Mandíbula

Zonas de suporte indicadas

Abrace o occipício tanto quanto seja possível. Procure zonas planas do suporte aos lados da cabeça, cara ou frente.

Posição de montagem

Algumas deformidades músculo-esqueléticas podem impedir que o nosso paciente mantenha a cabeça na linha média. Nestes casos, consideramos montar o suporte fora da linha média, seguindo assim, a trajectória da coluna cervical e cabeça do nosso paciente.

Para completar um apoio de cabeça Whitmyer é preciso selecionar uma almofada e um braço de montagem. Em seguida, apresentamos todos os modelos de almofada disponíveis, que poderá combinar com um dos 5 braços de montagem disponíveis.

Almofadas apoio de cabeça



Plush



Plush ajustável



Contour Cradle



S.O.F.T. de 2 peças



S.O.F.T. de 3 peças



Heads Up



Atenção Precoce

Braços de montagem Whitmyer



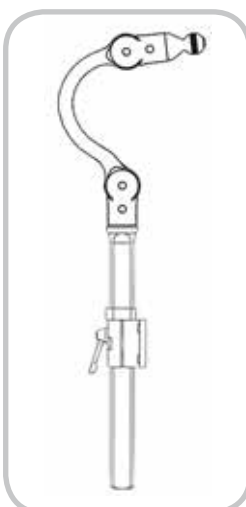
Alys




Linx



Pro



Cobra Xtra

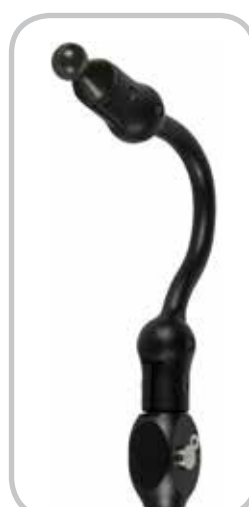

Cobra Xtra
abatível

Almofadas PLUSH (1 peça)

Almofada com contornos de espuma de alta qualidade, composta por capas com diferentes densidades. A sua forma única proporciona suporte posterior com um elevado grau de conforto e segurança para o paciente. Posicionamento de cabeça para uma óptima função.

Os tamanhos maiores oferecem profundidade e suporte extra para garantir que a cabeça fique bem centrada e segurança nos pacientes com movimentos involuntários e com alterações no seu comportamento.

Permite a junção de almofadas acessórias para suporte laterofacial e/ou anterior



PLUSH



48 cm Ref. P1900L



36 cm Ref. P1400L



25 cm Ref. P1000L



20 cm Ref. P800L



15 cm Ref. P605L

Características e especificações técnicas

- Espuma de elevada qualidade laminada em capas de diferentes densidades:
 - Capa de suporte: : 1,6 cm de grossura composta por espuma de células fechadas; fácil de retirar e acoplar; livre de látex.
 - Capa Confort: 1,9 cm de grossura, espuma de poliuretano de células abertas (brancas).
- Funda de Lycra Preta com fecho standard. Resistente e duradoura.

Plush 48 cm. P1900L	9,5 cm	25,4 cm 17,8 cm	48,3 cm 22,9 cm 19 cm	4,4 cm
Plush 36 cm. P1400L	6,3 cm	19 cm 10,2 cm	33,6 cm 12,7 cm 19 cm	4,4 cm
Plush 25 cm. P1000L	3,2 cm	15,2 cm	23,5 cm 12,7 cm 19 cm	4,4 cm
Plush 20 cm. P800L	2,5 cm	14 cm	19 cm 12,7 cm 19 cm	4,4 cm
Plush 15 cm. P605L	2,5 cm	11,4 cm	15,2 cm 10,2 cm 15,2 cm	4,4 cm

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça

Almofadas PLUSH ajustável (1 peça)

Almofada com contornos de espuma de alta qualidade, composta por capas com diferentes densidades. A sua forma única proporciona suporte posterior com um elevado grau de conforto e segurança para o paciente. Posicionamento de cabeça para uma óptima função.

Os tamanhos maiores oferecem profundidade e suporte extra para garantir que a cabeça fique bem centrada e segurança nos pacientes com movimentos involuntários e com alterações no seu comportamento.

O modelo PLUSH AJUSTÁVEL apresenta uma secção central posterior e 2 laterais que podem ser articulados para atender à necessidade de otimizar o apoio lateral do usuário, permitindo controlar flexões activas ou passivas. Ideal para pacientes com fraco controlo de cabeça que requerem suporte lateral unilateral ou bilateral.

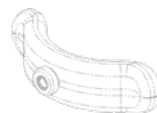
Ambos os modelos permitem a junção de almofadas acessórias para suporte laterofacial e/ou anterior



PLUSH ajustável



Grande. Ref. P8088L















Pequena. Ref. P8044L



Características e especificações técnicas

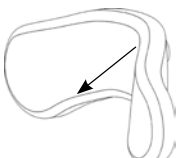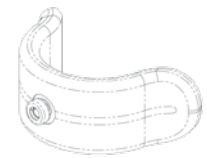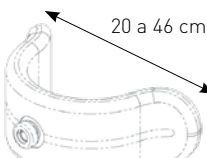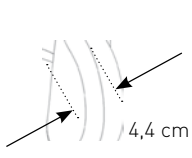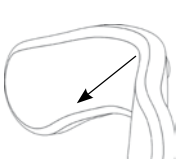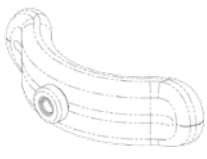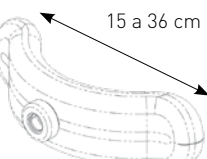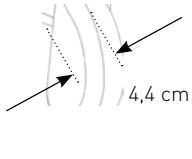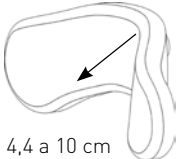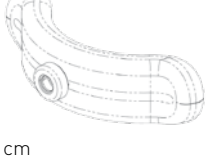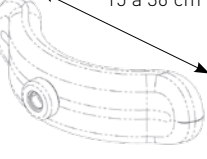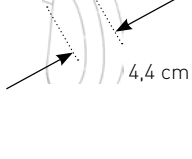- Espuma de elevada qualidade laminada em capas de diferentes densidades:
 - Capa de suporte: : 1,6 cm de grossura composta por espuma de células fechadas; fácil de retirar e acoplar; livre de látex.
 - Capa Confort: 1,9 cm de grossura, espuma de poliuretano de células abertas (brancas).
- Funda de Lycra Preta com fecho standard. Resistente e duradoura.

Grande. P8088L	 5 a 15 cm	 12,7 cm	 20 a 46 cm	 4,4 cm
	 5 a 15 cm	 12,7 cm	 20 a 46 cm	 4,4 cm
Pequena. P8044L	 4,4 a 10 cm	 7,6 cm	 15 a 36 cm	 4,4 cm

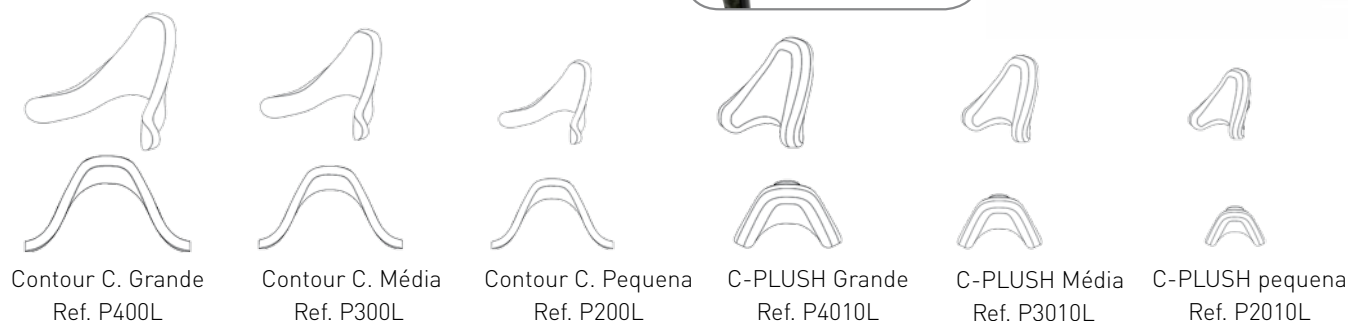
O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça

Almofadas CONTOURED CRADLE e C-PLUSH (1 peça)

A chave do êxito deriva da sua única forma anatómica, que oferece suporte sub occipital, occipital e lateral

Desenhado para abraçar o occipuccio e proporcionar suporte lateral à coluna cervical, oferece um alto grau de conforto e posicionamento sendo os suportes muito fáceis de ajustar. Os seus ajustes rotacionais permitem o posicionamento do suporte garantindo ao paciente a máxima superfície de contacto. A ampla gama de tamanhos permite posicionar desde bebé até adulto.

O modelo C-Plush possui uma maior grossura proporcionando comodidade e uma estabilidade extra ao usuário. Ideal para a sua utilização em cadeiras de rodas basculantes e/ou reclináveis, para pacientes com baixo tom e para corrigir/ acomodar ligeiras assimetrias laterais. Adicionando suportes látero faciais, botões-pulsadores e/ou suporte anterior para uma maior versatilidade.



Almofadas Contoured Cradle

Mesmas características que as almofadas SOFT (pág 10)

Contour Cradle Grande. P400L	
Contour Cradle Média. P300L	
Contour Cradle Pequena. P200L	

Almofadas C- PLUSH

Mesmas características que as almofadas PLUSH (pág 7)

C-PLUSH Grande. P4010L	
C-PLUSH Média. P3010L	
C-PLUSH Pequena. P2010L	

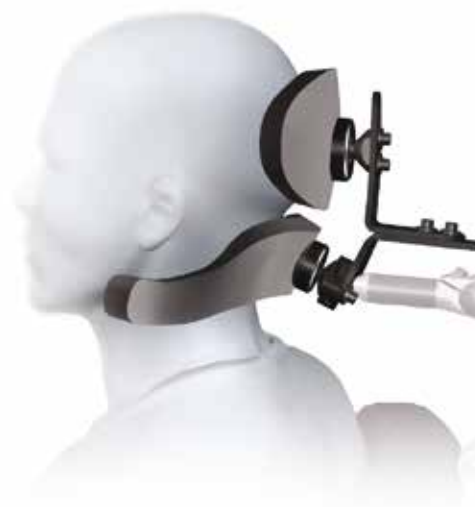
O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça

Almofadas S.O.F.T. de 2 peças


O sistema SOFT de 2 peças proporciona além do suporte occipital posterior, suporte a nível suboccipital e cervical lateral, graças à sua única almofada sub-occipital com contornos.

Fácil de ajustar, sendo único para este sistema, o ajuste independente em profundidade da almofada occipital em relação à sub-occipital.

Adicionando suportes laterofaciais, botões-pulsadores e/ou suporte anterior para uma maior versatilidade. Ideal para pacientes que necessitam de uma acomodação/ correção de flexões laterais moderadas.




Almofadas

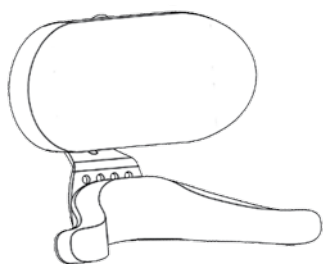


SS10L

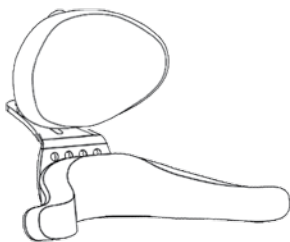Occipital Plush 25 cms
com sub-occipital Adulto




SS8L

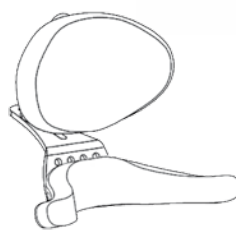Occipital Adulto (10x15cms)
com sub-occipital adulto.



SS4L

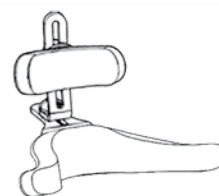Occipital Adulto (10x15cms)
com sub-occipital Pediátrico



SS3L

Occipital Pediátrico
com sub-occipital pediátrico








Características e especificações técnicas

- Espuma de elevada qualidade de células fechadas; Livre de látex
 - Funda de Lycra preta com fecho standard
- Combinação de neopreno com Lycra laminada na capa externa e nylon na capa interna. Muito resistente e duradoura.

Especificações técnicas das almofadas occipitais


Plush 25 cm P1000L				
Occipital Adulto P600L				
Occipital Pediátrico P500L				

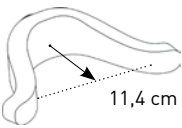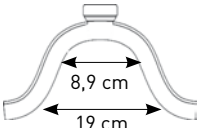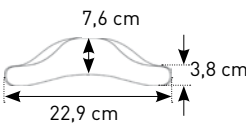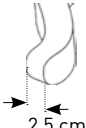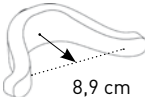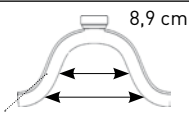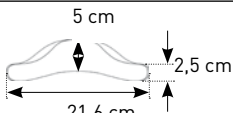Especificações técnicas das almofadas sub-occipitais

Sub -occipital Adulto				
PSS01L				
Sub-occipital Pediátrico				
PSS03L				

Placa de Montagem para almofadas SOFT de 2 Peças

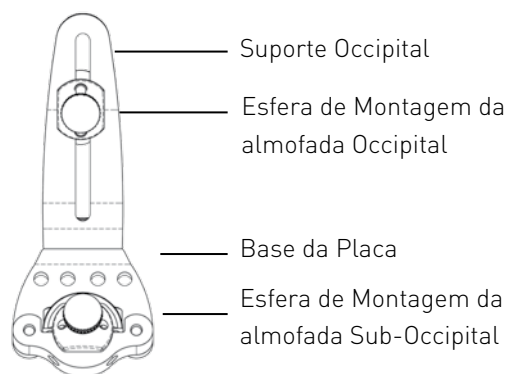Ref. M9275








O desenho universal da placa para almofadas SOFT de duas peças encaixa perfeitamente em qualquer braço de montagem Whitmyer.

A esfera de montagem da almofada sub-occipital permite um ângulo completo de basculação e rotação da placa.

A esfera de montagem da almofada occipital permite ajustes rotacionais e ajustes em altura.

A regulação anterior e posterior independente é possível através do desenho do suporte occipital.

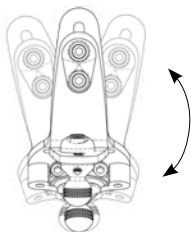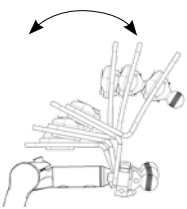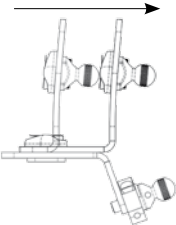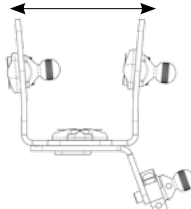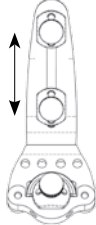Regulações da placa

Rotacional	Rotação anterior	Costas	Montagem Invertida	Altura
				
30°	30°	5,7 cm	12,7 cm	5 cm

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.

Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça

Almofadas S.O.F.T. de 3 peças

O sistema SOFT de 3 peças está indicado nos posicionamentos de cabeça mais desafiantes. Este sistema patenteado de 3 almofadas combina 2 almofadas sub-occipitais ajustáveis em largura e rotação com uma almofada occipital com ajuste antero-posterior independente.

A capacidade de ajuste adicionada e independente das almofadas sub-occipitais individuais, permitirá uma acomodação/correção de posturas assimétricas e deformidades.

Esta configuração única proporciona máximo suporte occipital e cervical a nível proximal e lateral, sendo ideal para posicionamentos mais agressivos.

Adicionando suportes latero-faciais, botões-pulsadores e/ou suporte anterior para uma maior versatilidade.




SOFT Adulto



SOFT8L: Occipital Plush 25cms com sub-occipital tamanho 1



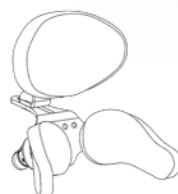SOFT5L: Occipital Plush 20cms com sub-occipital tamanho 1




SOFT2L: Occipital Adulto com sub-occipitais tamanho 2




SOFT1L: Occipital Adulto com sub-occipitais tamanho 1

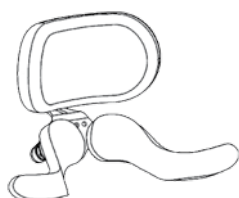
SOFT Pediatria




SOFT7L: Occipital Plush 20cms com sub-occipitais tamanho 3

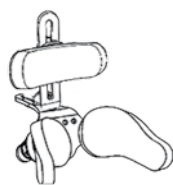

SOFT6L: Occipital Pediátrico com sub-occipitais tamanho 4

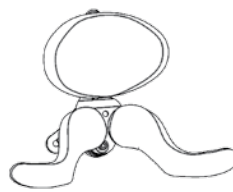

SOFT4L: Occipital Adulto com sub-occipitais tamanho 3

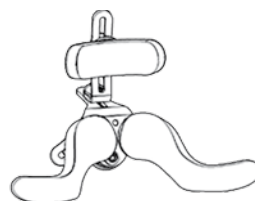
















SOFT3L: Occipital pediátrico com sub-occipitais tamanho 3

Especificações técnicas das almofadas occipitais

Plush 25 cm P1000L	3,2 cm	15,2 cm	23,5 cm	12,7 cm
Plush 20 cm P800L	2,5 cm	14 cm	19 cm	12,7 cm
Occipital Adulto P600 L	2,2 cm	15,2 cm	15,2 cm	10,2 cm
Occipital Pediátrico P500 L	1,6 cm	12,7 cm	12,7 cm	5,7 cm

Mesmas características que as almofadas SOFT de 2 Peças (pág 10)

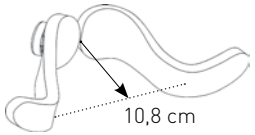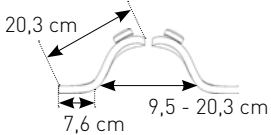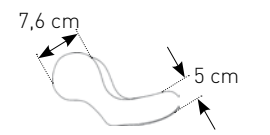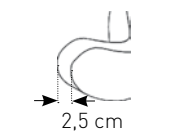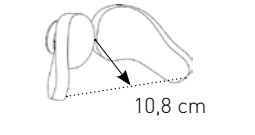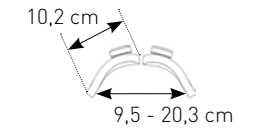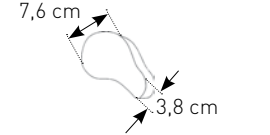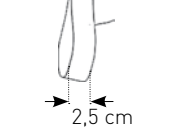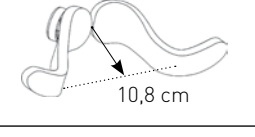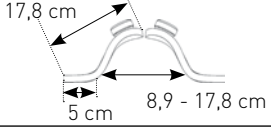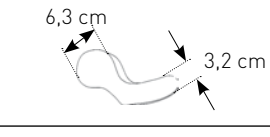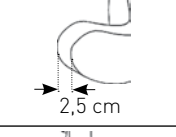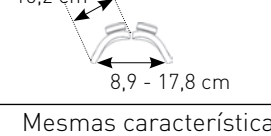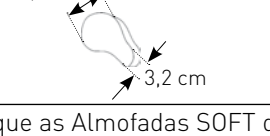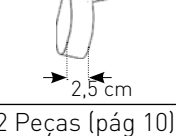
Especificações das almofadas sub-occipitais

Tamanho 1 Adulto PS01RL / PS01LL				
Tamanho 2 Adulto PS02RL / PS02LL				
Tamanho 3 Pediátrico PS03RL / PS03LL				
Tamanho 4 Pediátrico PS04RL / PS04LL				

Mesmas características que as Almofadas SOFT de 2 Peças (pág 10)

Placa de Montagem para Almofadas SOFT de 3 Peças

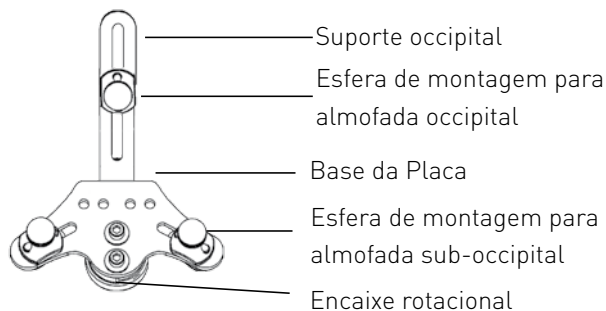Ref. M9375






O desenho universal da placa para almofadas SOFT de 3 Peças encaixa perfeitamente em qualquer braço de montagem Whitmyer.

O encaixe rotacional permite um ângulo completo de basculação e rotação da placa.

As esferas de montagem das almofadas sub-occipitais permitem ajustar as almofadas em largura e ângulo para conseguir uma óptima distribuição da pressão nos posicionamentos mais agressivos.

A esfera de montagem da almofada occipital permite regular a altura e profundidade da almofada para um posicionamento óptimo e anatómico da cabeça do nosso paciente.

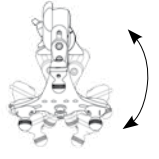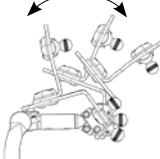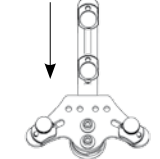Regulações da placa

Rotacional	Rotação anterior	Costas	Montagem invertida	Altura
				
30°	30°	5,7 cm	12,7 cm	5 cm

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça

Apoios de cabeça HEADS UP

Heads Up é um suporte de cabeça inovador, desenhado para maximizar a interação do usuário com o seu ambiente. Adiciona ao suporte de cabeça, estabilidade anterior e lateral de ombros e tronco para um ótimo posicionamento da cabeça.

O apoio de cabeça Heads Up está disponível em 4 tamanhos: Atenção Temprana, Pequena, Médio ou Grande. Além disso, permite selecionar 2 diferentes alturas de almofada (alta ou baixa) e também 2 tipos de funda (lycra ou dartex) e 2 tipos de espuma (standard ou confort).

Os braços de suporte estão disponíveis em 2 comprimentos: curtos ou longos. São abatíveis para facilitar as transferências e ajustáveis na parte inferior para uma máxima adaptação ao usuário.

Permite selecionar 2 opções de suporte de cabeça: almofada Contour cradle ou suporte de 2 peças: suboccipital + occipital para um ótimo suporte e posicionamento nos casos mais complexos.



Braços de suporte para estabilização anterior e lateral



Heads Up com almofada Contour Cradle



Heads Up de 2 peças: Suboccipital + occipital



Suporte de queixo incluído em todos os modelos


	7 cm	6,3 cm	Baixa: 6,3 cm Alta: 9,1 cm	Largos: 18,5 cm Curtos: 14,2 cm
Atenção Temprana				
Pequeno				
Médio				
Grande				

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça





Apoios de cabeça Atenção Precoce



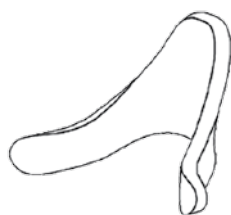Contour Cradle, Atenção Precoce











Ref. INFT200

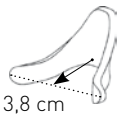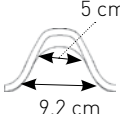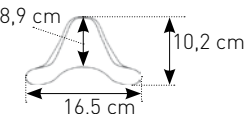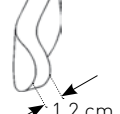Almofadas Contoured Cradle , atenção precoce			
			

SOFT de 3 peças, Atenção Precoce



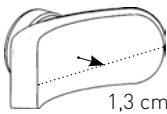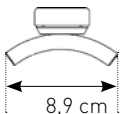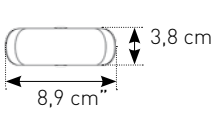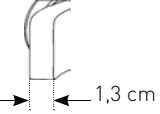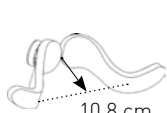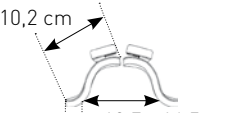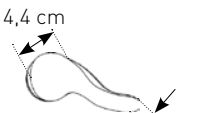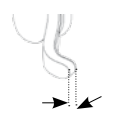Ref. SOFT-AT *



Almofada occipital INFT100L			
			
Almofadas sub-occipitais INFT-RL / INFT-LL			
			

* Inclui a placa de montagem para as almofadas de 3 peças. (ref. M9375)

Braços de montagem para apoios de cabeça Atenção Precoce

Os apoios de cabeça da Atenção Precoce combinam preferencialmente com os braços de montagem **Pro Pediátrico** e em especial com **Cobra Xtra Rebatível Atenção Precoce** (ver especificações na pág. 19 e 21)

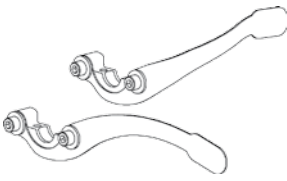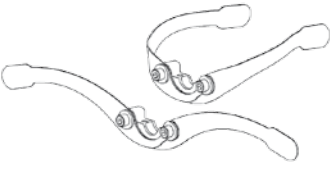Suportes latero-faciais e suportes anteriores Atenção Precoce

	Cinta frontal AP	Suporte unilateral AP	Suporte bilateral AP
			
Ref.	INFT500	INFT700	INFT750

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça

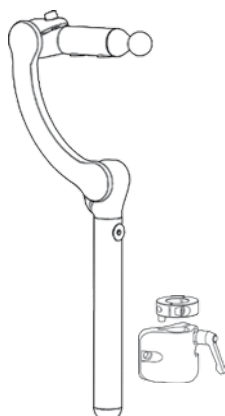
Braços de montagem Whitmyer

AXYS




Ref. AXYS

LINX




Ref. LINX

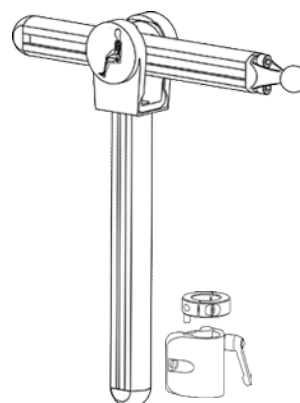PRO




Pro Adulto: Ref. PRO-A
Pro Pediátrico: Ref. PRO-P

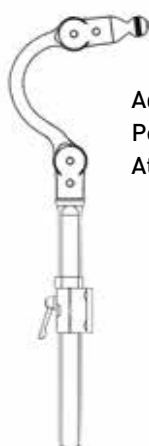Cobra Xtra



Adulto Ref. CBRA7010
Pediátrico: Ref. CBRA7030
Atenção Precoce: Ref. CBRA7080

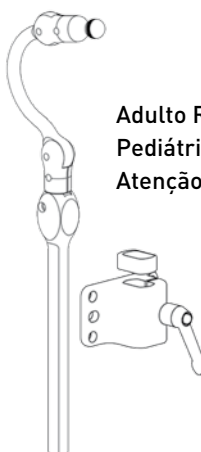Cobra Xtra Abatível




Adulto Ref. CBRA5010
Pediátrico: Ref. CBRA5030
Atenção Precoce: Ref. CBRA5080

Todos os braços de montagem incluem a placa de suporte

Placa de suporte rebatível

A placa de suporte rebatível para braços de montagem AXYS, LINX e PRO permite-nos abater (fazer baixar) o apoio de cabeça para facilitar as transferências do paciente e retirar facilmente nos momentos que necessite.

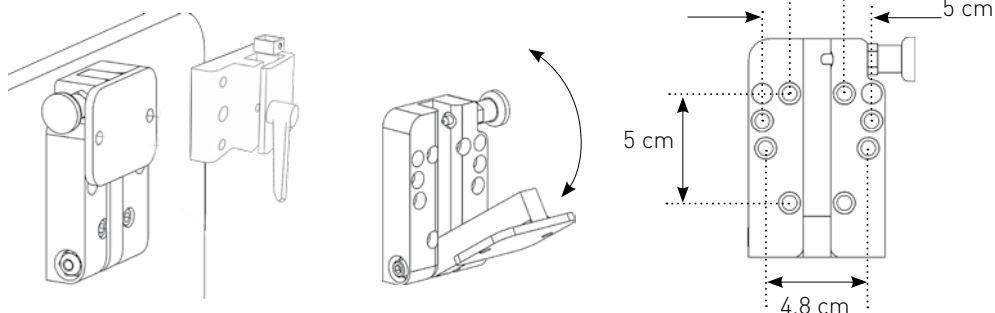Ref. M5000



Os braços de montagem COBRA XTRA e COBRA XTRA abatível incorporam a placa rebatível de série.

**O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.
Seleccionar almofada para completar o apoio de cabeça**

Braço de montagem AXYS



Características

O braço de montagem AXYS é o mais básico da gama Whitmyer. O seu acabamento cromado em preto apresenta-se como uma opção de montagem compacta e atractiva. Fácil de ajustar e modificar, é compatível com todas as opções e acessórios Whitmyer.

Considerações Especiais:

Rode a barra horizontal 180º para obter um maior ângulo de ajuste para a almofada.

Gire a barra vertical para um maior ajuste em frente. Ideal para no caso de rectificação da coluna.

Braço de montagem AXYS


- Referência: AXYS
- Material: Aço
- Inclui placa de Suporte (ref. J3EUHDMKSD)
- Placa de suporte abatível opcional (ref. M5000)

Especificações técnicas

	Ajuste em altura	Regulação em prof.	Ângulo de rotação	Furos de montagem	Posição de montagem
Standard	30, 5 cm	15,2 cm	30°	4,8 - 5 cm de distância entre furos	7,6 cm mínimo do bordo superior do encosto

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.
Seleccionar almofada para completar o apoio de cabeça

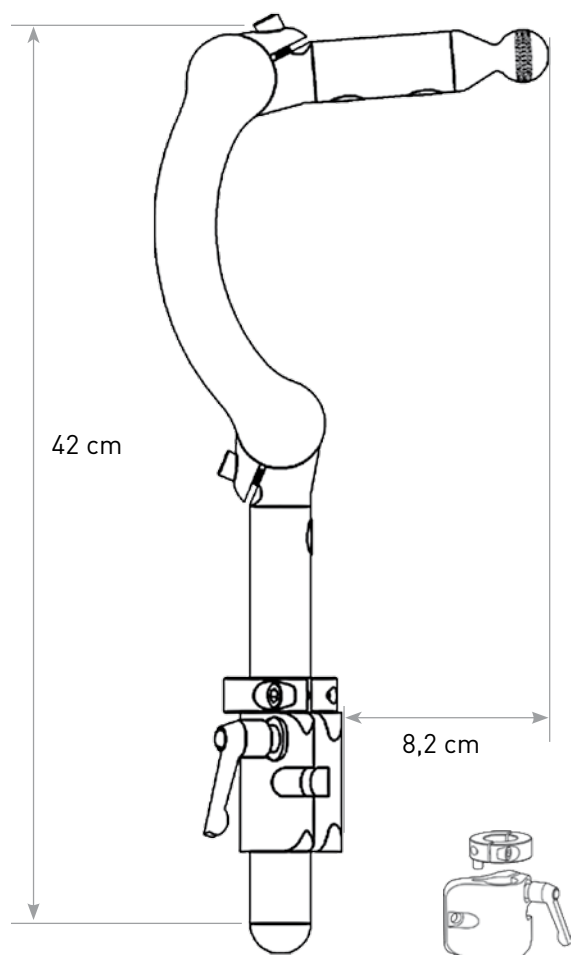Braço de montagem LINX



Características

O braço de montagem LINX é o conceito mais recente no campo de braços de montagem para apoio de cabeças.

Combinado apenas 2 pontos de regulação permitindo um movimento anterior e posterior fluído proporcionando assim, um ângulo infinito de posições da superfície do suporte.

O preto acetinado do tubo em contraste com as abraçadeiras de alumínio e a esfera de montagem granulada, garantem uma estabilidade nos ajustes com um look sofisticado.

Braço de montagem elegante, com múltiplas regulações e fácil de ajustar e instalar.

Braço de montagem LINX


- Referência: LINX
- Material: Alumínio e aço inoxidável
- Inclui placa de suporte (ref. M2300)
- Placa de suporte abatível opcional (ref. M5000)

Especificações técnicas

	Ajuste em altura	Regulação em prof.	Ângulo de rotação	Furos de montagem	Posição de montagem
Standard	17,8 cm	21,6 cm para a frente 1,9 cm para trás	30°	4,8 -5 cm de distância entre os furos	15 cms mínimo do bordo superior do encosto

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.
 Seleccionar almofada para completar o apoio de cabeça

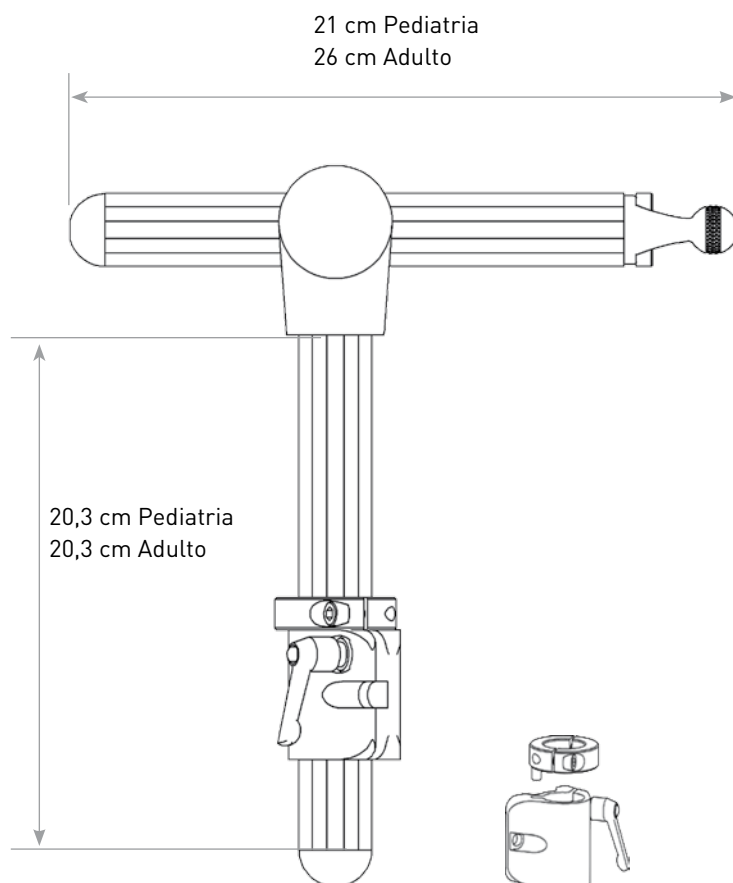Braço de montagem PRO



Características

O braço de montagem PRO está especialmente indicado para aplicações complexas.

Este braço de montagem é ideal para posicionamentos agressivos e/ou espasmos muito intensos. É a solução ideal para utilização em Centros de Reabilitação Neurológicos.

Fácil de ajustar e muito estável.

Considerações Especiais:

Disponível o braço PRO OFF-Set para regulações desde a parte detrás do apoio de cabeça e no caso dos usuários com costas delgadas ou com rectificações na coluna.

- Braço de montagem PRO Adulto. Ref: PRO-A
- Braço de montagem PRO Pediátrico. Ref: PRO-P
- Material: Alumínio, acabamentos em preto anodizado.
- Inclui placa de suporte (ref. M2200-WB)
- Placa de suporte rebatível opcional (ref. M5000)


Especificações técnicas

	Ajuste em altura	Regulação em prof.*	Ângulo de rotação	Furos de montagem	Posição de montagem
Adulto	15 cm	Desde 3,8 cm até 20,3cm para a frente	45°	4,8 - 5 cm de distância entre os furos	7,6 cm mínimo do bordo superior do encosto
Pediatria	15 cm	Desde 3,8 cm até 20,3 cm para a frente	45°	4,8 - 5 cm de distância entre os furos	7,6 cm mínimo do bordo superior do encosto

* Para regulação costas, ver pág 27 (braço de montagem PRO com Off-set)

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.
Seleccionar almofada para completar o apoio de cabeça

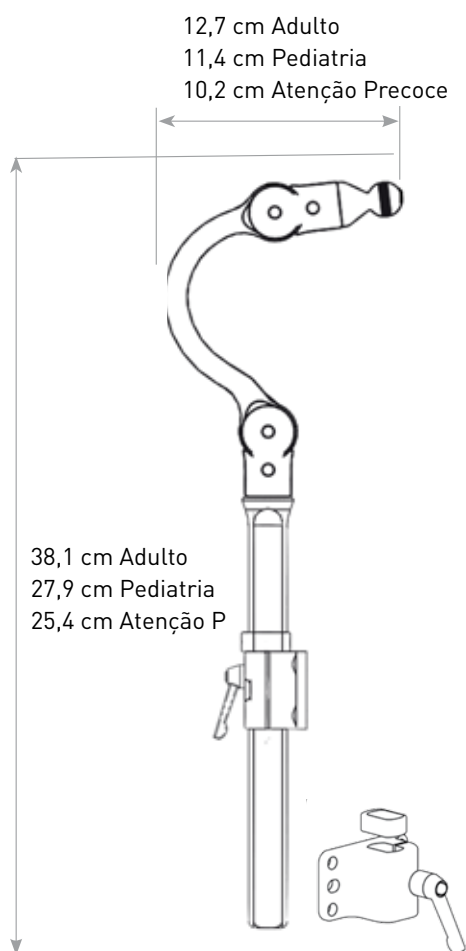Braço de montagem COBRA XTRA



Características

O braço de montagem Cobra XTRA tem um desenho elegante, é forte e facilmente ajustável.

Com força superior e com um amplo ângulo de posicionamento, o braço de montagem Cobra XTRA está disponível em tamanho pequeno (Atenção Precoce), Médio (Pediatria), e Grande (Adulto).

Os componentes são modulares e fáceis de trocar para facilitar um ótimo posicionamento na almofada do encosto do usuário, adaptando-se a alterações posteriores do paciente desde a prescrição inicial.


- Braço de montagem Cobra Xtra Adulto (ref. CBRA7010)
- Braço de montagem Cobra Xtra Pediatria (ref. CBRA7030)
- Braço de montagem Cobra Xtra Atenção Precoce (ref. CBRA7080)
- Inclui placa de suporte: (ref. J3EUHDMKFB)
- Material: Alumínio, finalizado em preto anodizado
- Inclui mecanismo rebatível de série.

Especificações técnicas

	Ajuste em altura	Regulação em prof.	Ângulo de rotação	Furos de montagem	Posição de montagem
Adulto	14 cm	16,5 cm para a frente 5 cm para trás	30°	4,8 - 5 cm de distância entre os furos	12,7 cm mínimo do bordo superior do encosto
Pediatria	6,3 cm	12,7 cm para a frente 3,8 cm para trás	30°	4,8 - 5 cm de distância entre os furos	12,7 cm mínimo do bordo superior do encosto
Atenção Precoce	6,3 cm	10,2 cm para a frente 1,3 cm para trás	30°	4,8 - 5 cm de distância entre os furos	12,7 cm mínimo do bordo superior do encosto

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.
Seleccionar almofada para completar o apoio de cabeça

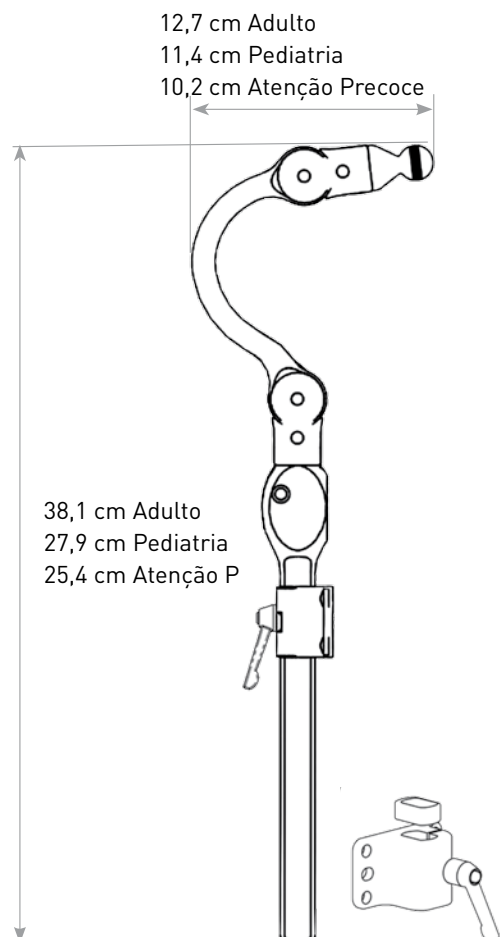Braço de montagem COBRA XTRA rebatível



Características

O braço de montagem rebatível COBRA XTRA é forte, fácil de ajustar e com um look elegante.

Pressionando um pequeno botão lateral, o Cobra XTRA é facilmente rebatível, permitindo retirar o apoio de cabeça totalmente, desde a parte traseira na cadeira do usuário.

Com força superior e com um amplo ângulo de posicionamento, o braço de montagem Cobra XTRA rebatível está disponível em tamanho pequeno (Atenção Precoce), Médio (Pediatria), e Grande (Adulto).

Os componentes são modulares e fáceis de trocar para facilitar um ótimo posicionamento na almofada do encosto do usuário, adaptando-se a alterações posteriores do paciente desde a prescrição inicial.

- Braço de montagem Cobra Xtra Rebatível Adulto (ref. CBRA5010)
- Braço de montagem Cobra Xtra Rebatível Pediatria (ref. CBRA5030)
- Braço de montagem Cobra Xtra Rebatível Atenção Precoce (ref. CBRA5080)
- Inclui placa de suporte: (ref. J3EUHDMKFB)
- Material: Alumínio, finalizado em preto anodizado
- Inclui mecanismo rebatível de série.

Especificações técnicas

	Ajuste em altura	Regulação em prof.	Ângulo de rotação	Furos de montagem	Posição de montagem
Adulto	14 cm	16,5 cm para a frente 5 cm para trás	30°	4,8 - 5 cm de distância entre os furos	12,7 cm mínimo do bordo superior do encosto
Pediatria	6,3 cm	12,7 cm para a frente 3,8 cm para trás	30°	4,8 - 5 cm de distância entre os furos	12,7 cm mínimo do bordo superior do encosto
Atenção Precoce	6,3 cm	10,2 cm para a frente 1,3 cm para trás	30°	4,8 - 5 cm de distância entre os furos	12,7 cm mínimo do bordo superior do encosto

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem.
Seleccionar almofada para completar o apoio de cabeça

Suportes Latero-Faciais

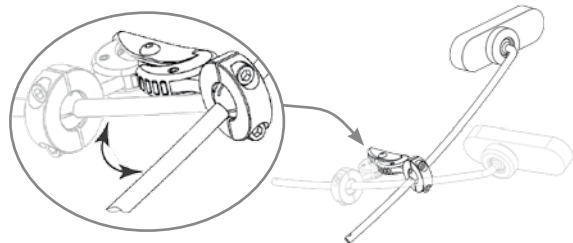
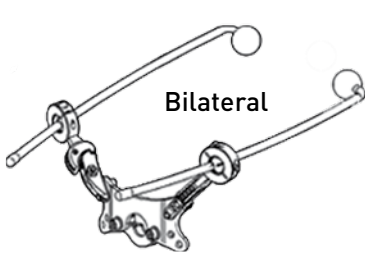
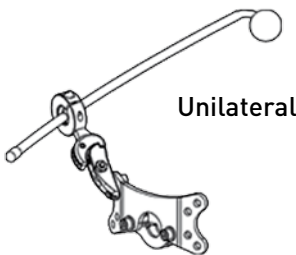
Os Suportes Latero-Faciais são aplicados para corrigir, acomodar ou bloquear desvios em flexões laterais e/ou padrões rotativos, proporcionar a superfície de contacto para um óptimo posicionamento ou posicionar um botão-pulsador (mola) acima da coluna cervical.



O seu sistema de montagem rebatível permite retirar o suporte lateral para facilitar as transferências do usuário ou retirá-lo quando fôr necessário.

A vareta curva, graças à sua esfera rotacional permite posicionar bem as almofadas lateralmente ou na parte traseira (anterior) ao usuário.

A ampla gama de 7 almofadas latero-faciais, com diferentes formas asseguram o posicionamento do suporte até onde fôr necessário clinicamente para o usuário.




NOTA: Todos os suportes latero-faciais são rebatíveis.

* Para encomendar um suporte latero-facial deve seleccionar a base do suporte (Ref. LM),o tipo de almofada e no caso dos apoios de cabeça de 1 peça (PLUSH, Contoured Cradle e C-Plush) também uma placa de montagem.

Placas de montagem para suportes latero-faciais (apenas necessário nos apoios de cabeça de 1 peça)



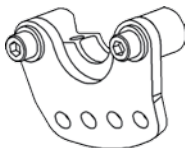Ref. LM-PL



Ref. LM-CCS

Placa latero-facial PLUSH e C-PLUSH

Placa latero-facial Contoured Cradle

* Os apoios de cabeça SOFT (de 2 e 3 peças) não requerem nenhuma destas placas.

Tipos de almofadas

	Redonda	Standard	Larga	Ovalada	C-grande	C-média	C-pequena
Ref.	PL10L	PL15L	PL20L	P600L	PL30L	PL35L	PL40L

Suportes anteriores

Todos os apoios de cabeça Whitmyer permitem ajustar diferentes suportes anteriores para garantir o óptimo posicionamento da cabeça do usuário.

Antes de aplicar qualquer suporte anterior ou lateral devemos, sempre, assegurar que o usuário está posicionado de uma forma estável, o mais simétrico possível, de acordo com o seu estado clínico.

- **A cinta frontal dinâmica** facilita a posição erguida da cabeça, ao mesmo tempo que permite o movimento rotacional da cabeça do usuário. Ideal para pacientes hipotónicos com fraco controlo de cabeça, pacientes com tendência a flexionar a cabeça para a frente, ou usuários que requerem uma posição erguida da cabeça por razões médicas, por exemplo: respiração/ deglutição comprometidas.

Esta cinta é utilizada com êxito para aplicações dirigidas a uma função precisa, como a interacção escolar ou durante a refeição (alimentação).

- **O suporte frontal dinâmico** constitui outra opção estética e adequada para os usuários em que a cinta não obtém os resultados clínicos pretendidos.

- **A cinta frontal estática** está desenhada para actuar como um perímetro que limita a extensão do movimento traseiro (anterior) e/ou lateral. Ajustando correctamente a cinta entre 0,60 – 1,20cms da frente do paciente, permitirá que o paciente mova a cabeça unicamente neste arco.

A cinta é ajustável em profundidade e em ângulo, permitindo a posição óptima do usuário. Esta cinta está indicada para os pacientes com um certo controlo de cabeça, assegurando o seu posicionamento durante a sedestação prolongada e especialmente para dar um suporte extra à cabeça em terrenos irregulares ou noutros obstáculos..

- **A cinta frontal semi-dinâmica**, permite a mesma capacidade de movimento que a cinta frontal dinâmica (DSF1), mas com certas capacidades estáticas devido ao seu novo sistema de montagem (foi substituído o sistema de roldanas por um sistema de guias).

Desenhada para os usuários que necessitam de suporte anterior (traseiro) constante com liberdade de movimento, mas com maior segurança e controlo. Proporciona as melhores características de ambas as cintas (dinâmica e estática) num único desenho.

- * Para pedir um conjunto de suporte anterior (traseiro) deve seleccionar o tipo de suporte pretendido e a placa de suporte anterior.

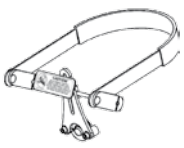


Placa para suporte anterior

Ref. D1010

* Os apoios de cabeça SOFT (de 2 e 3 peças) não requerem esta placa.

Tipos de suportes anteriores

	Cinta frontal dinâmica	Cinta frontal semi-dinâmica	Suporte frontal dinâmico	Cinta frontal estática
				
Adulto	DFS1	DFSQ1	CAP1 (preto)	HU1
Pediatria	DFS3	DFSQ3	CAP3-R (vermelho) CAP3-B (azul)	HU1

Acessórios e soluções personalizadas

Opções de fundas

Whitmyer oferece 3 opções de fundas:

- Lycra standard. Todos os apoios de cabeça, incluindo os suportes latero-faciais têm de série a funda de lycra.
- Vinil (Dartex Reversed). Disponível como opção sem encargo adicional. Neste caso para uma correcta referência deve se substituir o "L" de lycra da parte final da referência por "V" de vinil.
- Borrego. Apenas fornecidas como substituto.



LYCRA

- Elástica em 4 direcções
- Exterior em lycra forrada de neoprene
- Interior é nylon laminado
- Resistente e duradoura



BORREGO

- Lã natural de cordeiro
- Respirável
- Minimiza a fricção
- Apenas fornecida como substituto



VINIL, Dartex® Reversed

- Elástica em 2 direcções
- Impermeável e anti-alérgica
- Lisa e muito suave ao tacto
- Ideal para usuários com muita agitação
- Parte lateral e posterior em lycra.

Almofadas de gel



Almofadas de gel da Whitmyer proporcionam suporte assegurando máxima protecção e conforto através do movimento fluído do gel, o que não se encontra nas de espuma clássica.

As almofadas de gel minimizam a fricção e proporcionam uma óptima distribuição da pressão estando indicadas para usuários hipertónicos e/ou hiperclínicos.

O gel é composto por líquidos com enlaces cruzados cientificamente, que formam um polímero semi-sólido de elevada qualidade, o qual possui uma composição similar ao tecido adiposo..

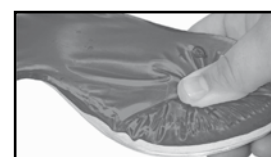
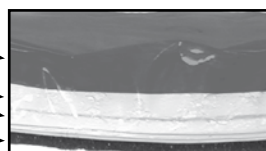
Cada pad de gel é composto de capas de polímero sobre uma capa de suporte de espuma de uretano, todo ele selado com uma cobertura de uretano. Livre de látex, não tóxico e antibacteriano.

Disponível para a almofada occipital adulto, pediátrica, a almofada laterofacial standard e para as almofadas sub-occipitais tamanho 1 e 3.

Capa de polímero em gel

Capa de espuma


Capa de Velcro



	SOFT 1L	SOFT 4L	SOFT 3L	Almofada laterofacial standard
Ref.	PG1	PG4	PG3	PG500

Outros acessórios

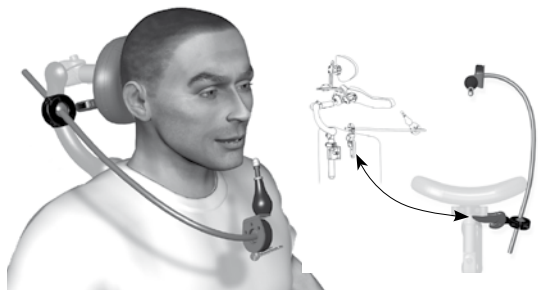Suporte para Mini Joystick



Facilita o posicionamento preciso do joystick através de duas articulações completamente rotacionais, mantendo a possibilidade de fazer baixar o joystick.

A vareta curva permite os ajustes tanto rotacionais como longitudinais. Muito ajustável e rebatível!

O sistema permite ser instalado sobre um apoio de cabeças Whitmyer ou sobre o encosto do sistema de sedestação.

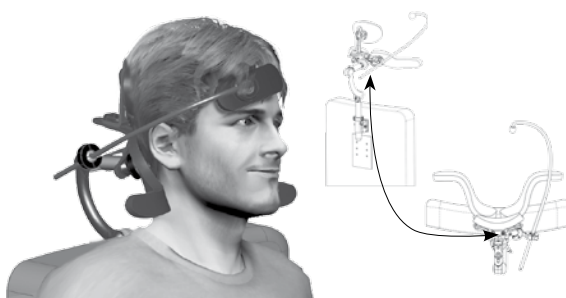
O suporte rebatível LM115 deve ser encomendado à parte.

O Mini Joystick não está incluído.

Referências:

- LM1094-Suporte Mini Joystick
- LM1092- Suporte Mini Joystick com placa PLUSH
- LM1093-Suporte Mini Joystick com placa Contour Cradle
- LM-CB- Suporte para montagem Mini Joystick em encosto

Vareta curva para suporte anterior




Permite o posicionamento preciso de um pad ou de um botão-mola na parte frontal do usuário. Pode ser instalado à direita ou à esquerda do usuário ou também desde a parte média, proporcionando o posicionamento do pad ou do botão-mola (de pressão), e mantendo espaço suficiente entre a cabeça do usuário e o hardware.

O encaixe de montagem rebatível possui um mecanismo que automaticamente bloqueia quando se volta para a posição pré-ajustada. Suporte rebatível (LM115) e o pad devem ser encomendados à parte.

Referências:

- LM2094-Vara curva para suporte anterior em sistema SOFT
- LM2092- Vara curva para suporte anterior com placa PLUSH
- LM2093- Vara curva para suporte anterior com placa Contour Cradle

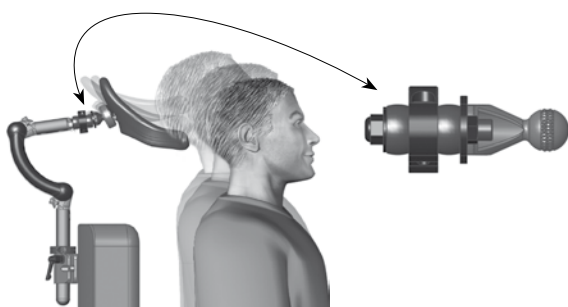Placa de suporte Flex




Permite a flexo-extensão da cabeça do usuário quando este se apoia contra a almofada. Esta acção dinâmica permite ao usuário manter o contacto com a almofada de suporte durante o seu padrão extensor.

A placa de suporte Flex utiliza buchas elastómeros para aplicar a correcta resistência permitindo à almofada de suporte regressar, suavemente, à posição neutra.

Entre o braço de montagem e a almofada de suporte, a placa de suporte Flex pode ser usada com a maioria dos acessórios dos apoios de cabeça Whitmyer.

Referência: M9450

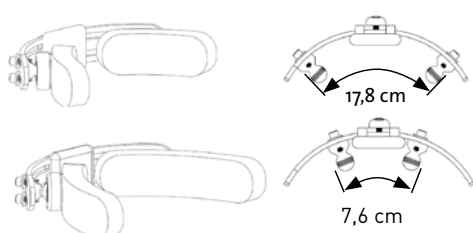Suporte occipital em T



Corrige e/ou bloqueia os padrões rotacionais ou em flexão lateral, mantendo a cabeça na posição centrada. Ideal, também, nos casos em que se deve evitar o contacto occipital a nível central.

Proporciona excelente suporte lateral occipital.

Utilizado em sistemas SOFT de 2 e 3 peças.

Referências:

- PLT15L -Suporte occipital em T com almofadas curtas
- PLT20L -Suporte occipital em T com almofadas largas

Outros acessórios

Kit DEMO



O Kit DEMO constitui uma valiosa ferramenta de trabalho que permite ao profissional eleger a solução mais adequada de suporte de cabeça para cada usuário. Permite uma adequada selecção e aplicação da gama de apoios de cabeça Whitmyer.

O kit está contido numa caixa robusta com rodas e asa telescópica para um fácil e cómodo transporte de uma ampla selecção de produtos e acessórios.

O kit inclui um sistema de montagem para encaixar o apoio de cabeça à cadeira do usuário durante a sua avaliação, sem necessidade de modificar a cadeira do paciente.

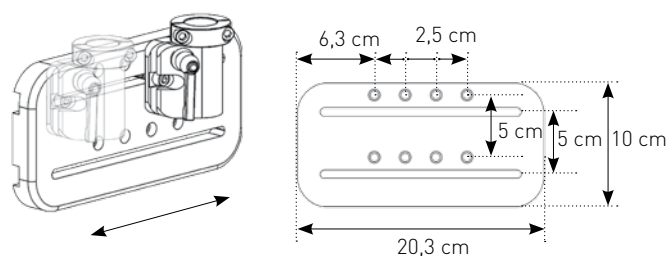
O seu preço é extremamente vantajoso e apenas se vende ao profissional para o seu uso nas avaliações.

El kit incluye:

Braço de montagem AXYS, almofadas Plush 20,25 e 36 cms, Contour Cradle Médio, Almofada Plush ajustável grande, SOFT de 3 peças pediátrico, SOFT de 3 peças adulto, suporte laterofacial bilateral com almofada redonda, standard e larga, cinta frontal dinâmica, placa anterior e placa lateral, suporte occipital em T, sistema de montagem para cadeiras sem encosto rígido, kit de ferramentas e lubrificante para hardware.

Referência: KIT-100SP

Placa lateral




Esta placa com guias permite o posicionamento do apoio de cabeça lateralmente à linha média para adaptar-se à cabeça dos usuários que apresentam consideráveis desvios laterais de tronco.

A placa fixa-se nos furos préfixados do encosto e permite um movimento lateral de 10 cms para a direita e para a esquerda.

Ideal para adaptar posições particulares dos apoios de cabeça, compensar posições erradas ou reposicionar o apoio de cabeça de uma forma mais alinhada com a direcção das forças aplicadas.

Referência: M7010

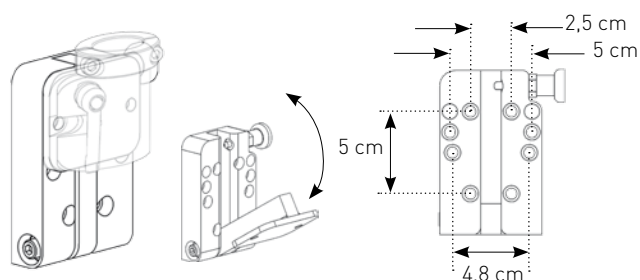Placa universal rebatível




As placas de todos os braços de montagem Whitmyer são compatíveis com a placa universal rebatível.

A placa rebatível aplica-se directamente sobre o encosto e a placa de suporte aplica-se sobre a placa rebatível, resultando num conjunto que permite rebater o apoio de cabeça facilitando assim as transferências do usuário.

Referência: M5000

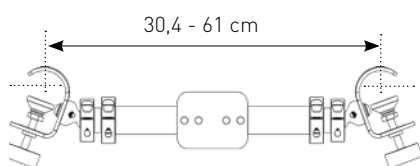Sistema de montagem para cadeiras sem encosto rígido





Este sistema de montagem permite instalar fácil e rapidamente o apoio de cabeça a qualquer cadeira sem encosto rígido, sem necessidade de prefurar ou inserir mais componentes.

Utilizando os tubos do encosto da cadeira como pontos de fixação, os encaixes do sistema adaptam-se a tubos angulares ou punhos, permitindo encaixar o sistema nas cadeiras desde 30 cms até 60 cms de largura.

Referência: M7000


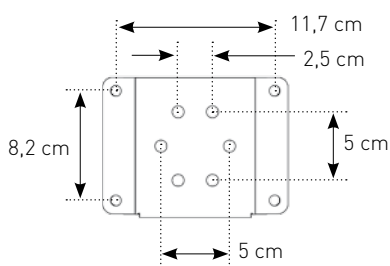
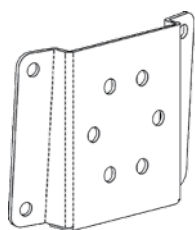
Placa de suporte para encostos de plástico



Especialmente desenhado para instalar apoio de cabeça em encostos que não são rígidos, proporciona uma superfície plana que reforça a placa de suporte distribuindo as forças junto de uma superfície de contacto mais ampla.

Referência: M1010

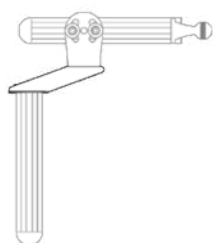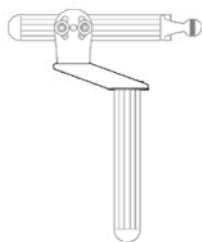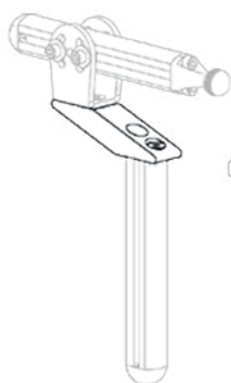Braço de montagem PRO com Off-set



Regulação para a frente

Regulação costas

Permite 6,3 cms de regulação desde as costas desde o ponto de encaixe da barra horizontal.

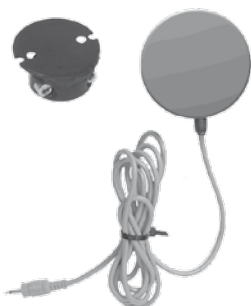
Rodando a barra horizontal (ver desenho) obtém-se, também, a possibilidade de uma regulação de 6,3 cms para a frente.

Ideal para usuários que necessitam de uma regulação extra como casos com cifoescoliosis, coreções da coluna etc.

Referência: PRC7070

Placa de montagem NÃO incluída (ref. M2200-WB)

Botão Pulsador Dura-Soft



Desenhado para operar sistemas de controle ambiental, computadores e acessórios de comunicação aumentativa. Veja os suportes látero-faciais para opções de montagem.

O pulsador é fornecido com cabo de 1,5 mm e uma ficha Jack de 0,3 mm. O botão pulsador Dura-Soft é adequado para a activação mediante contacto facial graças á sua extrema sensibilidade de activação e a sua resistência á água.

Referências:

FS0-8- Botão Pulsador Dura-Soft com suporte de montagem

FS0-8A- Apenas o botão pulsador Dura-Soft

F700- Apenas o suporte de montagem



Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34

Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt



Rev.9- Abril 2015