



# Almofada JAY XTREME ACTIVE

Proteção da pele para usuários ativos



# Proteção da pele e estabilidade para o usuário ativo

JAY Xtreme Active é uma almofada leveira e de baixo perfil que facilita as transferências e a propulsão. Criada especialmente para proporcionar redução de pressão e estabilidade pélvica aos usuários ativos, mas sem comprometer a sua funcionalidade.

A **bolsa de fluido JAY**, em combinação com a funda ampla e flexível, otimiza a proteção da pele e minimiza a fricção que se produz nos usuários ativos durante a propulsão e as transferências, protegendo assim a zona isquiática.

Além disso o sistema de **funda dupla** favorece a respiração da pele dissipando o calor e a humidade para uma máxima proteção da pele.

Com o **kit de posicionamento** opcional para assegurar o alinhamento dos membros inferiores.





## PROTEÇÃO MODULAR PARA UM RITMO DE VIDA ATIVO

A almofada JAY Xtreme Active permite selecionar 2 tamanhos diferentes da bolsa de fluído, em função das necessidades clínicas de cada usuário:

**Bolsa de Fluído Standard:** Oferece um nível de redistribuição da pressão de moderado a alto e é a solução ideal para a grande maioria dos usuários.  
Ao selecionar esta opção a almofada leva de serie a base de espuma standard.

**Bolsa de Fluído Overfill:** A bolsa de fluído Overfill incorpora uma maior quantidade de fluído para favorecer a imersão dos ísquios e garantir uma redistribuição da pressão superior nos usuários com maior necessidade de proteção da pele. Indicado em usuários com atrofia muscular avançada e elevada fragilidade/ sensibilidade da pele, que não desejam uma almofada pesada nem de alto perfil mas que requerem proteção muito alta nas zonas proeminentes da pélvis.  
Ao selecionar esta opção a almofada leva de serie uma base com uma ondulada pélvica maior.



→ **Bolsa de fluído Standard**  
com base de espuma standard.



→ **Bolsa de fluído Overfill**  
para casos de atrofia muscular severa. Sempre com a base da ondulada pélvica mais ampla.

Funda exterior

Funda interior

Base de espuma leveira



→ **Funda microclimática**



→ **Funda elástica**



→ **Funda incontinência**

## Tecnologia de funda dupla

- ▶ A almofada JAY Xtreme Active incorpora de serie 2 fundas: uma interior e outra exterior. Esta combinação permite obter ao mesmo tempo uma óptima ventilação da pele e uma eficaz proteção da almofada contra a incontinência do usuário.
- ▶ A funda interior é resistente à incontinência e é muito fácil de retirar e limpar. Com tecnologia Aqua-guard e cosida especial no fecho para garantir que a base de espuma se mantém sempre seca. A funda exterior Microclimática com tecnologia 3DX™ favorece a ventilação e dissipa o calor e a humidade para salvaguardar a integridade da pele.
- ▶ A almofada JAY Xtreme Active permite também seleccionar outros 2 tipos de funda exterior: de Incontinência ou Elástica. Todas elas com um prático bolso.
- ▶ Todas as fundas são válidas tanto para a bolsa de fluído standard como para a Overfill e, graças à sua flexibilidade, permite incorporar a almofada às cunhas de posicionamento sem gerar tensões. Além disso, pode ser lavada na máquina até 60° C e são de secagem rápida.



## KIT DE POSICIONAMENTO OPCIONAL

A almofada Xtreme Active oferece a opção de adicionar um kit de posicionamento para garantir o alinhamento dos membros inferiores e otimizar a tolerância à sedestação do usuário (conforto). Este kit é composto por 3 cunhas, que podem adicionar-se facilmente à funda interior da almofada mediante velcros, para assim adaptar-se às necessidades de posicionamento específicas de cada usuário.

### → Kit de Posicionamento

Este kit é composto por 2 cunhas adutoras de 2,5 cms de alto e uma cunha abductora de 2,5 cm.



## JAY XTREME ACTIVE

<b>Largura da almofada</b>	34 cm a 50 cm (em incrementos de 2 cm)
<b>Profundidade da almofada</b>	34 cm a 50 cm (em incrementos de 2 cm)
<b>Altura da almofada</b>	5 cm
<b>Peso máximo do usuário</b>	150 kg
<b>Peso da almofada</b>	1,7 kg (almofada de 40x40 cm com fluído standard); 2,2 kg (almofada de 40x40 cm com fluído overfill)
<b>Preenchimento da ondulada</b>	Bolsa de Fluído JAY (Standard ou Overfill)
<b>Funda exterior</b>	De Incontinência, Microclimática ou Elástica
<b>Kit de posicionamento</b>	Opcional. Inclui 2 cunhas adutoras e 1 cunha abduutora (de 2,5 cm de altura)



Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

### Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España  
Tel: +34 (0)902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)