

# XTREME ACTIVE KISSEN

Hautschutz für beschwerdefreies Sitzen





## MODULARE BAUWEISE DES XTREME ACTIVE KISSENS

Das Xtreme Active Kissen bietet zwei verschiedene Optionen für Fluid-Einlagen.

**Fluid-Einlage (S):** Einlage mit geringerer Fluid-Menge, die eine allgemeine bis hohe Druckverteilung für die Bedürfnisse der meisten Nutzer bietet. Sie wird mit der Basisschale S geliefert.

**Fluid-Einlage (L):** Für Nutzer mit fortgeschrittener Muskelatrophie ausgelegt, die mehr Fluid unter Ihren Sitzbeinhöckern benötigen. Die Fluid-Einlage verfügt über eine höhere Fluid-Menge für optimales Einsinken und hohe Druckverteilung. Dafür ist die Beckenmulde der Basisschale L vergrößert.



→ **Fluid-Einlage (S)**  
mit Basisschale S.



→ **Fluid-Einlage (L)**  
bei fortgeschrittener Muskelatrophie. Bei dieser Basisschalenversion L ist die Beckenmulde größer.

# HAUTSCHUTZ UND STABILITÄT FÜR DEN AKTIVEN NUTZER

Das Xtreme Active Kissen ist ein leichtes und flaches Kissen für aktive Nutzer. Konzipiert für hohe Druckentlastung und gute Sitzstabilität. Das Kissen ist sehr pflegeleicht.

Die **JAY Fluid-Einlage**, verfügbar in den Größen S und L maximiert die Erhaltung der Hautgesundheit und reduziert die Einwirkung von Scherkräften.

Durch das **System mit zwei Bezügen** zirkuliert die Luft besser. Zusätzlich werden Wärme und Feuchtigkeit effektiver abgeleitet.

Die Oberschenkelpositionierung kann durch den nachträglichen Einbau von **Beinführungskeilen** erfolgen.





## BEINFÜHRUNGSKEILE

Für das Xtreme Active sind optionale, vor Ort anpassbare Beinführungskeile erhältlich. Die 2,5 cm hohen Adduktor- und Abduktorkerle können mit Klettverschlüssen ganz einfach am inneren Bezug befestigt werden. Damit werden die Oberschenkel besser geführt und positioniert. Somit verbessert sich die Sitzstabilität und die Sitztoleranz wird erhöht.

→ **Beinführungskeil-Set**  
enthält zwei Adduktorkeile  
und einen Abduktorkerl.

Äußerer Bezug

Innerer Bezug

Leichte Schaumstoffunterlage



→ **Mikroklima-Bezug**



→ **Stretch-Bezug**



→ **Inkontinenzbezug**

## TECHNIK MIT ZWEI BEZÜGEN

- › Das Xtreme Active Kissen weist ein System mit zwei Bezügen auf. Die innovative Technologie mit einem inneren und äußeren Bezug sorgt für ein angenehmes Mikroklima und gleichzeitig für ein effektives Inkontinenzmanagement.
- › Der innere Bezug ist wasserabweisend und lässt sich einfach abwischen und reinigen. Die wasserundurchlässigen Nähte sowie der patentierte Aquaguard™ Reißverschluss sorgen dafür, dass die Schaumstoffunterlage trocken bleibt.
- › Das Xtreme Active Kissen ist mit einem äußeren Mikroklima-, Stretch- oder Inkontinenzbezug erhältlich. Alle Kissen werden mit einer praktischen Zubehörtasche geliefert, die an den Bezug angenäht ist.
- › Alle inneren und äußeren Bezüge passen zu beiden Größen der Fluid-Einlagen und die Beinführungskeile können ohne Oberflächenspannung eingesetzt werden.
- › Alle Bezüge können bei 60° C gewaschen werden.



## TECHNISCHE DATEN

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kissenbreite</b>                    | 34 cm – 50 cm (in 2 cm Schritten)                                          |
| <b>Kissentiefe</b>                     | 34 cm – 50 cm (in 2 cm Schritten)                                          |
| <b>Kissenhöhe</b>                      | 6 cm                                                                       |
| <b>Körpergewicht des Benutzers</b>     | 150 kg                                                                     |
| <b>Kissengewicht</b>                   | 1,7 kg (40 x 40 mit Fluid-Einlage S); 2,2 kg (40 x 40 mit Fluid-Einlage L) |
| <b>Kissenmaterial</b>                  | Basis: Kaltschaum, Einlage: Fluid                                          |
| <b>Äußerer Bezug</b>                   | Mikroklima-, Stretch- und Inkontinenzbezug                                 |
| <b>Innerer Kissenbezug</b>             | Wasserabweisend                                                            |
| <b>Einsatz</b>                         | Dekubitusrisiko: mittel - hoch; Einstufung nach EPUAP* bis Stufe 2         |
| <b>Beinführungskeil-Set</b>            | Enthält 2 Adduktorkerle und 1 Abduktorkerl; alle 2,5 cm hoch (optional)    |
| <b>Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.</b> | 11.39.02.1009                                                              |

Weitere Informationen zu den kompletten technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular.

Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf [www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de) zur Verfügung oder es ist auch im Großdruck erhältlich.



\*European Pressure Ulcer Advisory Panel



### Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4  
D-69254 Malsch/HD  
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0  
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222  
E-Mail: [kundenservice@sunrisemedical.de](mailto:kundenservice@sunrisemedical.de)  
[www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de)