


zippie®
Explore your world!



Zippie RS

De veelzijdige kantelrolstoel



Instelbaar voor iedereen!



» Een modern ontwerp met gepatenteerde kanteltechnologie



RS: Rotation-in-Space

Het zitframe draait rond het zwaartepunt van de gebruiker voor een optimale drukverdeling. Hierdoor blijft de Zippie RS met zijn korte wielbasis zeer stabiel. Ook zorgt het gepatenteerde principe voor een gelijkmatige en gecontroleerde kanteling met een bereik van 45° (-5° tot 40°).



De accessoirebox is makkelijk te bereiken, zelfs wanneer het zitframe volledig is gekanteld.

De Zippie RS is ontworpen voor verschillende positionerings-behoefes. Bijvoorbeeld het vereenvoudigen van voeding en respiratoire (ademhaling) functies, reduceren van druk onder het bekken en het verbeteren van visuele oriëntatie. Door de verstellingen kan direct een andere zithouding gecreëerd worden, dit is belangrijk wanneer het zelfstandig verzitten niet eenvoudig gaat.





Makkelijk individueel in te stellen

Door de uitgebreide instelmogelijkheden is het eenvoudig om de Zippie RS aan te passen aan de individuele wensen van de gebruiker.

INSTELBARE ZITDIEPTE

De zitdiepte is in te stellen van 37.5 tot 45 cm. Bij groei of verandering in het ziektebeeld kan de rolstoel gemakkelijk aangepast worden.



ZWAARTEPUNTINSTELLING

Twee verschillende zwaartepuntposities bepalen of de rolstoel actieve of passieve rij-eigenschappen heeft. De passieve instelling zorgt voor meer stabiliteit en de actieve instelling voor goede rij-eigenschappen en wendbaarheid. Ook is het mogelijk om de zithoogte met maximaal 8 cm te veranderen om zo de ideale zithoogte te bereiken.



RUGHOEKVERSTELLING MET GASVEER (OPTIE)

Door middel van de gasveer is de rughoekverstelling eenvoudig te bedienen en traploos te verstellen. Dit in combinatie met de kantelverstelling zorgt voor een optimale drukverdeling.

IN HOOGTE EN IN HOEK VERSTELBARE DUWBEUGEL

Voor het optimaal bedienen van de verstellingen kan de rugleuning 15 cm traploos veresteld worden. Samen met de in hoek verstelbare duwbeugel zorgt dit voor een ergonomisch verantwoorde houding tijdens het duwen van de rolstoel.



OPKLAPBARE ALUMINIUM VOETPLAAT

De centrale voetplaat met hielrand is in hoogte en hoek instelbaar en heeft een flip-up (opklapbaar) mechanisme. De voetplaat is eenvoudig in te stellen en aan te passen voor de gebruiker.

WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN

De wegzwenkbare beensteunen kunnen onafhankelijk van het zitframe in breedte worden ingesteld (maximaal 7 cm aan beide zijde). Hierdoor kunnen de benen optimaal gepositioneerd worden.





Geschikt voor diverse zitsystemen

Het is eenvoudig om diverse zitsystemen en ortheses op de Zippie RS te monteren. De zitsystemen worden rechtstreeks door middel van de ontvangstadapter en fixatiestang op de basisplaat en rugleuning vastgezet.



De Zippie RS met speciale zitorthese



De Zippie RS met Jay zitkussen en rugleuning



Verschillende opties en accessoires

Een uitgebreide reeks aan opties maakt het mogelijk de Zippie RS aan de meest uiteenlopende wensen aan te passen.



ALUMINIUM ONTVANGSTADAPTER

Met de gecrashteste ontvangstadapter is het eenvoudig om een ander zitsysteem te plaatsen.



FIXATIESTANG VOOR ZITSYSTEMEN

Door de fixatiestang aan de rugbuizen te monteren zit de zitschaal vast aan de rugleuning, wat meer stabiliteit geeft.



ACCESSOIREBOX

De accessoirebox bevindt zich onder het basisframe en is onder andere geschikt voor medisch apparaat met een maximale belasting van 13 kg. De accessoirebox wordt niet beperkt door het kantelmechanisme.



ZIJKANT MET SPATBORD

Bij het kantelen van de rolstoel blijven de zijpanelen op hun plaats waardoor de achterwielen (22" of 24") altijd bedekt blijven.



SINGLE POST ARMSTEUN

De in hoogte instelbare armsteunen bieden een uitstekende positionering van de armen met een minimaal gewicht.



KNIEHEVELREMMEN

Een extra rem voor meer veiligheid. De Zippie RS is altijd voorzien van trommelremmen.



TRAPBUIS

Een makkelijke manier om de rolstoel met de voet te kliepen.



ANTI-TIP VOORZIENING

De wegklapbare anti-tip voorziening zorgt ervoor dat de kantelrolstoel veilig achterover kan kliepen en geeft meer stabiliteit.



UNIVERSELE HOUDERS (15X15 MM)

Mogelijkheid om voetsteunen, armsteunen en hoofdsteunen te monteren of andere onderdelen/apparaten.

Technische specificaties

Zitbreedte:	30 - 40 cm
Zitdiepte:	37.5 - 45 cm
Zithoogte - voor:	43 - 52 cm
Rughoekinstelling:	90° - 120°
Rughoekverstelling:	90° - 120° of 85° - 115°
Kantelverstelling:	-5° - +40°
Zwaartepuntinstelling:	Actief of passief
Transportgewicht:	14 kg
Gewicht vanaf:	18 kg
Maximale gebruikersgewicht:	125 kg

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij je naar het orderformulier.

Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.

- De Zippie RS is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19.



Sunrise Medical B.V.

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
The Netherlands

T: +31 (0)30 - 60 82 100
E: info@sunrisemedical.nl

www.SunriseMedical.nl