

Korrigerig av bäcken på Jay Balance fluid dyna

Korrigerig av bäcken kan göras på två sätt på Balance Fluid dynan.

1. Vid beställning av ny dyna

Fluidinlägget har en höger och en vänster kammare. Då man önskar höja ena sidan för att korrigerig en felställning kan dynan beställas överfylld i höger alternativt vänster kammare. Skulle extra fluid behövas i båda kamrarna kan även både höger och vänster kammare beställas överfylld.

2. Vid anpassning av befintlig dyna

Som tillbehör finns extra fluidkuddar som kommer i en stor och en liten variant (bild 1). Den stora har artikelnummer F119 och den lilla F1119. För korrigerig av bäcken kan dessa sättas fast med medföljande kardborrband på önskad sida under dynans fluid inlägg (bild 2). Alternativt kan de sättas under båda sidorna om extra fluid önskas. Montering görs genom att fluidpåsen trycks ihop något och fästes så att den hamnar i botten längst fram i sittgropen (bild 3).

