


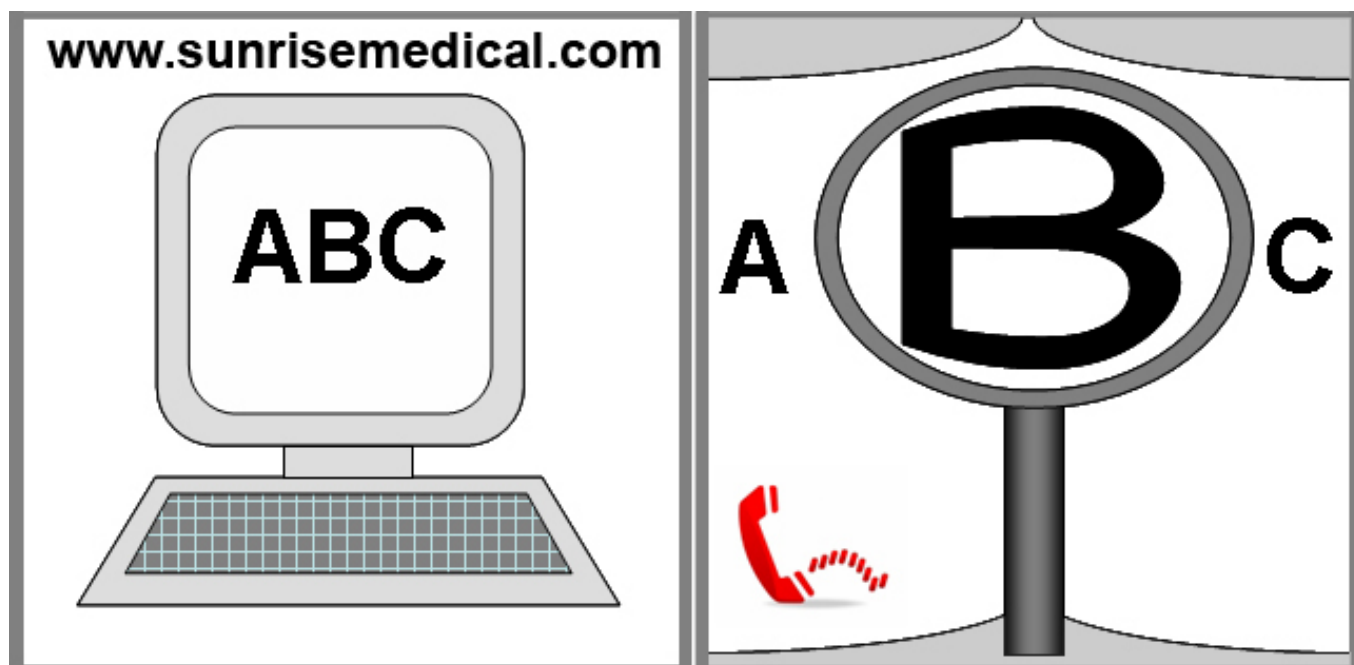

Shark RS/RT

BRUKSANVISNING


QUICKIE®



Handcykeldelar

SE

SUNRISE MEDICAL innehar ett ISO 9001-certifikat, vilket säkerställer våra produkters kvalitet i varje led från FoU till produktion. Dessa produkter uppfyller kraven i enlighet med EU:s riktlinjer. Tillval eller tillbehör finns tillgängliga till extra kostnad

HANDCYKEL:

1. DRIVHJUL
2. RYGGSTÖD
3. RYGGKLÄDSEL
4. VÄXELREGLAGE
5. FRAMHJUL
6. BENSTÖD
7. PARKERINGSBROMS
8. STÖTFÅNGARE



Förord

Kära Kund,

Vi är mycket glada över att du har bestämt dig för en högkvalitativ produkt från SUNRISE MEDICAL.

Denna bruksanvisning ger många tips och idéer så att din nya hand cykel kan bli en trovärdig och pålitlig partner i ditt liv.

Att upprätthålla nära band till våra kunder betyder mycket för oss på Sunrise Medical. Vi gillar att hålla dig uppdaterad om nya och aktuella utvecklingen på vårt företag. Att hålla nära våra kunder innebär: snabb service, så lite byråkrati som möjligt, arbetar tillsammans med våra kunder. När du behöver reservdelar eller tillbehör, eller om du bara har en fråga om din hand cykel - vi finns där för dig.

Vi vill att du ska vara nöjd med våra produkter och service. På Sunrise Medical arbetar vi ständigt med att utveckla våra produkter ytterligare. Av denna anledning kan förändringar sker i vår palett av produkter med avseende på form, teknik och utrustning. Följaktligen kan inga anspråk tolkas från data eller bilder som ingår i den här bruksanvisningen.

Ledningssystemet av Sunrise Medical är certifierat enligt EN ISO 9001, ISO 13485 och ISO 14001.



Som tillverkare, SUNRISE MEDICAL, förklarar att hand cyklarna överensstämmer med den 93/42 / EEG direktiv.

Kontakta din lokala auktoriserade Sunrise Medical återförsäljare om du har några frågor om användning, underhåll eller säkerhet av din hand cykel.

Om det inte finns någon auktoriserad återförsäljare i ditt område, eller om du har några frågor, kontakta Sunrise Medical antingen skriftligen eller per telefon.

Sunrise Medical Limited
High Street, Wollaston
West Midlands, DY8 4PS
England
Tel .: +44 (0) 1384 446.688
www.sunrisemedical.com



VIKTIGT:

ANVÄND INTE DIN HAND BIKE TILLS denna manual har lästs och förståtts.

Användningsområde

Shark RS / RT fungerar både som ett stöd för fysisk träning samt för sport och fritidsaktiviteter.

Shark RS / RT ska göra det möjligt för användaren att kunna säkert täcka långa sträckor både ergonomi och på ett ekologiskt effektivt sätt.

Shark RS / RT ska kunna klara av asfalterade ytor och fasta banor med olika topografi.

Du får inte överstiga en hastighet som har justerats för att uppfylla säkerhetskraven och ta hänsyn till kapaciteten hos användaren.

Det är viktigt att du utför produktunderhåll och inspektera cykeln före varje användning

Livslängd

Den förväntade livslängden för handen cykel är 5 år, under förutsättning att:

Det används i strikt överensstämmelse med den avsedda användningen. Alla service- och underhålls krav är uppfyllda.

Innehållsförteckning

Handcykelkomponenter	3
Förord	4
Användningsområde.	4
definitioner	5
1.0 Allmänna säkerhetsföreskrifter	6
2,0 Garanti	7
3,0 Hantering	8
4,0 Tillbehör	8
Bromsar	8-9
fotstöd	10
RT växel	10
RS växel	10
Ryggstödsinställning	11
Höjd / djup justering av gaffeln	11
Bakaxel	12
5.0 Underhåll och skötsel	12
6,0 Däck underhåll	13
7.0 Avfallshantering / återvinning av material	13
8.0 Märkskylt	14
9,0 Åtdragningsmoment	15

Definitioner

Definitioner av ord som används i denna manual

Ord	Definition
 FARA!	Att ignorera dessa varningar kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.
 VARNING!	Varning till användaren om potentiell risk för skada om rådet inte följs.
 VIKTIGT!	Meddela användaren att potentiell skada på utrustningen kan förekomma om varningen ignoreras
OBS:	Generellt råd eller bästa praxis.
	Hänvisning till ytterligare dokumentation

OBS:

Anteckna gärna adress och telefonnummer till ditt serviceombud i utrymmet nedan.
Skulle din rullstol gå sönder kan du då snabbt komma i kontakt med dem och få hjälp.

Säljarens underskrift och stämpel

1.0 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Tekniken och konstruktionen av denna handcykel har utformats för att ge maximal säkerhet. Internationella säkerhetsstandarder har uppfyllts eller överträffats. Trots detta kan användare försätta sig själva i risk genom att använda sina handcyklar felaktigt. För din egen säkerhet, måste följande anvisningar följas.

Oprofessionellt eller felaktiga ändringar eller justeringar ökar olycksrisken. Som handcykel användare, är du också en del av den dagliga trafiken på gator och trottoarer, precis som alla andra. Vi vill därför påminna dig om att du måste följa alla tillämpliga trafiklagar. Var försiktig under din första åktur i denna handcykel. Lär känna din cykel.

Före varje användning bör följande kontrolleras:

Fasta axlar eller snabbkopplingsaxlar på bakhjulen.

Kardborreband på säten och ryggstöd

Däck, däcktryck och bromsar.

Före varje resa genomföra en okulärbesiktning av ramen, kontroll av sprickor och andra skador.



Innan du ändrar någon av de justeringar av denna handcykel, är det viktigt att läsa motsvarande avsnitt i bruksanvisningen.



VARNING!

- Överskrid **ALDRIG** maximal brukarvikt på 125 kg exklusive eventuella föremål som medtas på handcykeln. Om du överskrider maxlasten, kan detta leda till skador på handcykeln, förlust av kontroll, eller allvarlig skada för användaren och andra människor.
- Var försiktig när du använder handcykeln. Till exempel, undvika att köra mot ett hinder utan att sakta ner farten (steg, trottoarkant) eller håligheter.
- Din handcykel har inte utformats för transport i ett fordon. Sitt **INTE** i cykeln under en transport i ett fordon; Använd alltid en korrekt säkrad fordonssits!!
- Denna handcykel bör endast användas av en person åt gången. All annan användning överensstämmer inte med det avsedda ändamålet.
- Cykeln kan bara användas av en person med en maxvikt på upp till 125 kg.
- Användning av cykeln rekommenderas endast för dem som har fysisk och psykisk förmåga för att kunna klara av allmän trafik.
- Som nybörjare bör du cykla särskilt försiktigt i början.
- Bekanta dig med de allmänna trafikreglerna! För att uppnå en stabil färd när du kör rakt fram, där det är möjligt, bör du undvika förhastade svängrörelser när du kör fort eller svänger runt hörn.
- När du cyklar och bromsar, håll alltid stadigt i handtagen med båda händerna, annars finns det en stor risk för en olycka genom styrfel.
- Cykeln är en mekanisk draganordning. Hastigheten måste anpassas till de tekniska funktionerna i cykeln och terrängen.

- Vid körning på natten och i gryning / skymning, använd alltid lampor. När du är ute och reser långa sträckor, rekommenderar vi att du tar ett extrabatteri med dig.
- Cykla bara på asfalterade vägar, eller fasta, släta ytor. Vid körning över trottoarkanter, steg samt gropar, finns det en ökad risk för att välta.
- Anpassa sättet du kör efter din förmåga. Cykla långsamt och försiktigt, i synnerhet när man cyklar runt hörn.
- Sätt inte dina händer i kedjeområdet.
- Din cykel bör servas av din återförsäljare med jämna mellanrum.
- Var försiktig med eld, särskilt brinnande cigaretter. Sits och ryggklädsel kan ta eld.
- Med alla rörliga delar, finns det en risk att fingrar kan klämmas. Var därför alltid försiktig.
- Om handcykeln är föremål för direkt solljus / låga temperaturer under långa perioder, kan delar av din handcykel bli mycket varm ($> 41^{\circ}\text{C}$) eller mycket kall ($< 0^{\circ}$).
- Se alltid till att snabbkopplingen på bakhjulen är korrekt inställd.
- Handcykel bör inte användas i kraftigt regn, i snö eller på hala eller skadade ytor. Dessutom bör du undvika farliga områden.
- Se till att dina däck har tillräckligt mönsterdjup!
- Använd aldrig benstöden eller stötsfångare för att lyfta handcykeln
- Bekanta dig med bromssträckorna från olika hastigheter.
- Du bör endast använda produktkombinationer som har godkänts av Sunrise Medical.

Handcyklar som visas och beskrivs i den här handboken kanske inte överensstämmer i varje detalj exakt din egen modell. Men alla instruktioner är helt relevanta, oavsett eventuella detaljskillnader.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra vikter, mått eller andra tekniska data som visas i den här handboken. Alla siffror, mått och kapacitet som visas i den här handboken är ungefärliga och utgör inte specifikationer.

Före varje användning bör du utföra följande säkerhetskontroll

- Före varje färd, kontrollera däcktrycket. Om lufttrycket är för lågt, finns det en ökad risk för att välta när man kör runt hörn, kan det leda till ökad slitage och rullmotståndet ökar.
- Undvik skador på bowdenkablarna för växel och bromsenheterna. Det finns en risk för att klämma kabeln när du flyttar till / från cykeln och om du använder vevarmen felaktigt.
- Kontrollera att fotstöden sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att alla komponenter, i synnerhet alla skruvar är åtdragna.
- För att undvika allvarlig skada, måste du skydda dina fötter i fotstöden, med hjälp av kardborrebanden, innan resan.
- Använd alltid hjälm.
- Du bör alltid använda en säkerhetsflagga, på grund av den låga höjden på cykeln, kan du vara mindre synlig för annan trafik.

2.0 Garanti

Garanti

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter på något sätt.

Garantivillkor

1) reparation eller utbyte utförs av en auktoriserad Sunrise Medical återförsäljare / serviceverkstad.

2) För att använda garantin, kontakta serviceombud eller återförsäljare som godkänts av Sunrise Medical med exakt beskrivning av problemet. Om cykeln, då ett problem uppstår, skulle befinna sig alltför långt bort från det anvisade serviceombudet, kan reparationer eller utbyte servas av en annan serviceverkstad som är utsedd av tillverkaren. Cykeln måste repareras av ett av Sunrise Medical godkänt serviceombud.

3) Skulle någon eller några av handcykelns delar behöva repareras eller bytas ut som resultat av ett tillverknings och/eller materialfel inom 24 månader (5 år för ram och tvärstag) efter leverans till kunden, kan defekta delar repareras eller bytas ut utan kostnad.

Obs: Denna garanti kan inte överföras.

4) Garantin omfattar också alla reparerade eller utbytta delar under den återstående garantitiden för handcykeln.

5) För reservdelar som är monterade efter starten av den ursprungliga garantin, ger vi ytterligare 24 månaders garanti.

6) Förbrukningsdelar är normalt undantagna från garantin, utom när det gäller att ett tidigt slitage av den delen är ett direkt resultat av ett fabrikationsfel. Dessa poster ingår bl.a. klädsel, däck, innerslangar och liknande delar.

7) Ovanstående garantivillkor gäller för alla produktdelar för modeller som köps till fullpris.

8) Normalt vi inte ta ansvar om det krävs en reparation

eller utbyte av handcykeln för något av följande skäl:

a) Produkten eller del som inte har underhållits eller service i enlighet med tillverkarens rekommendationer som visas i bruksanvisningen och / eller servicehandboken. Tillbehör har använts som inte anses som originaltillbehör.

b) Handcykeln eller delar har skadats genom försumelse, olyckshändelse eller felaktig användning.

c) Ändringar på handcykeln eller delar, som inte är i enlighet med tillverkarens specifikationer eller utförda reparationer innan serviceombud informerats.

3.0 Hantering

Leverans

Din nya Shark RS / RT levereras färdigmonterad i en kartong. För att undvika eventuella skador under transport, förpackas lösdelar som ska monteras, såsom bakhjulen, separat i kartongen.

Uppackning:

- Kontrollera kartongen för yttre skador som kan ha orsakats under transport.
- Ta bort allt förpackningsmaterial.
- Ta alla cykeldelar (inklusive hjul) försiktigt ur boxen och kontrollera att de är kompletta.
- Kontrollera alla delar för ytskador, repor, sprickor, bucklor, deformationer och andra defekter.
- Om du hittar någon skada, eller om några delar saknas vänligen meddela oss omedelbart.

Transportera Shark RS / RT:

För att hålla Shark RS / RT så kompakt som möjligt, avlägsnas bakhjulen före transport och förpackas separat i lådan.

Hjulen monteras på bakaxeln genom att helt enkelt klicka på den i snabbkopplingsfästet eller genom att skruva dem, beroende på ditt val av axlar.



OBS!

Före varje användning måste du kontrollera att skruvar och plug är ordentligt fästa!

4.0 Tillbehör

Bromsar

Bromsar

Cykeln har två bromsar som fungerar oberoende av varandra.

Parkeringsbromsen (Fig. 4.1 + 4.2)

Parkeringsbromsarna, monterade på gaffeln fungera som hjulbultar. De kan också anbringas med hjälp av en låsarm. Låsningsspaken måste låsas på plats för dessa ska kunna fungera korrekt. Cykeln bör inte rulla när parkeringsbromsen används. Detta är det enda sättet att garantera en säker förflyttning till och från cykeln.

Färdbromsar (Fig. 4.3)

Med färdbromsarna kan du säkert och bekvämt bromsa handcykeln.



VIKTIGT

Om färdbromsarna inte skulle fungera, då kan parkeringsbromsarna användas en gång för nödbromsning. Därefter måste färdbromsarna repareras.

Fig. 4.1

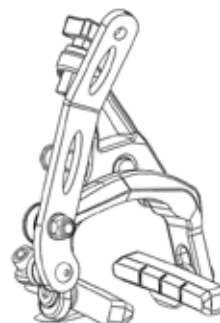


Fig. 4.2


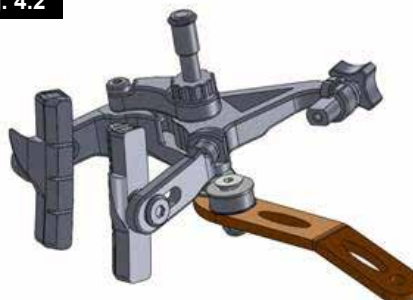


Fig. 4.3

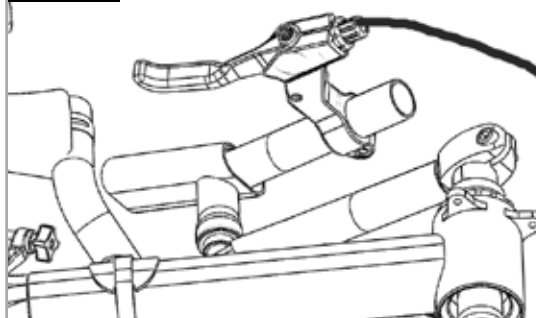

VIKTIGT!

Bromskraften minskar med:
Slitna slitbana, för lågt lufttryck, nedsmutsade och våta däck.

Men markytan kan också spela en viktig roll i att fördröja bromseffekt. Bromsverkan kommer att minska avsevärt om gator och vägar är våta och smutsiga, liksom på sandig eller stenig mark. Smutsiga och fuktiga fälgar och bromsbelägg kan också minska bromseffekten vid användning av fälgbromsar.

Av denna anledning bör du alltid anpassa din metod för cykling till de miljövillkor för att undvika allvarliga olyckor.

Kontrollera alltid effektiviteten av bromsarna innan resan och se till att det finns tillräckligt med bromsfunktion. Bromsarna ska kontrolleras regelbundet och justeras vid behov.

Vearmsbroms (Fig. 4.4 - 4.6)

Med vearmsbromsalternativet kan du bromsa genom att veva bakåt, när det används i kombination med kedjeväxling (Fig. 4.5). Det här alternativet krävs särskilt för användare med begränsad eller ingen fingerfunktion.

Bromssystemet kan bara kopplas bort för manövrering (Fig. 4.6).

När du cyklar eller åker framåt, använd vearmen för att sätta systemet i ett operativt läge.

VIKTIGT!

Körning med vearmsbromsen avaktiverad är inte tillåtet och kan leda till en ökad risk för olyckor.

Fotstöd

Jusering av fotstöd (Fig. 4.7 - 4.9)

Fotstöden kan justeras för att passa din benlängd. Justeringen kan göras efter att lossa skruvarna (1). När du justerar längden, måste du se till att benen är lätt vinklade och att de rör vid staget fram. När cykeln står stilla, bör du kontrollera att när du svänger maximalt, bör inte detta leda till att vearmen slår i dina ben. Det måste finnas ett utrymme på minst 5 cm mellan

Fig. 4.4

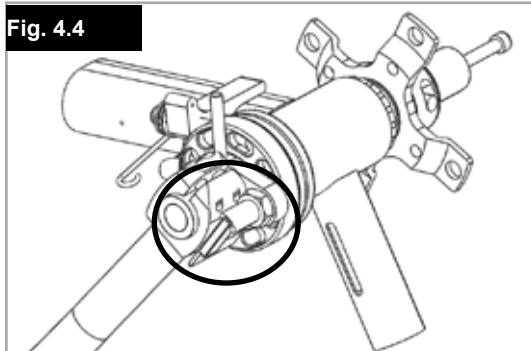



Fig. 4.5



Fig. 4.6



Fig. 4.7

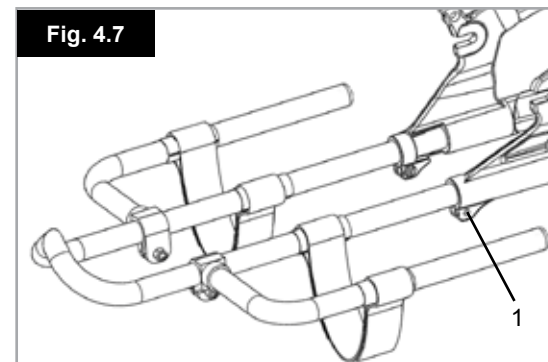

hålen och golvet. Du kommer att behöva denna spelrum när du kör runt hörn. När du är klar, se till att alla skruvar är korrekt åtdragna (se sidan om vridmoment).

Fotstödsrör för längre ben levereras alltid i maximal längd. Kunden kan sedan förkorta dem till önskad längd.

Efter att röret förkortats, måste du alltid se till att fotstödsröret trycks in gaffeln tillräckligt långt så att båda fästskruvarna fäster fotstödet i röret.

⚠ VIKTIGT!

Använd aldrig benstöden för att lyfta handcykeln. Före användning måste du skydda dina fötter i fotstöden. Om dina fötter kommer utanför av misstag när du cyklar, kan detta leda till allvarliga skador.

Fig. 4.8



Fig. 4.9



Fig. 4.10

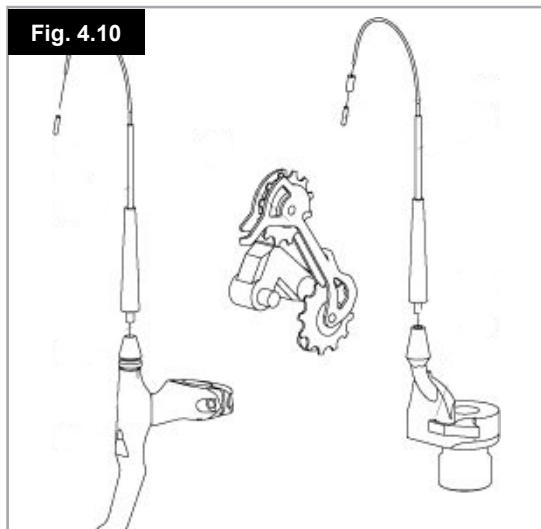


Fig. 4.11


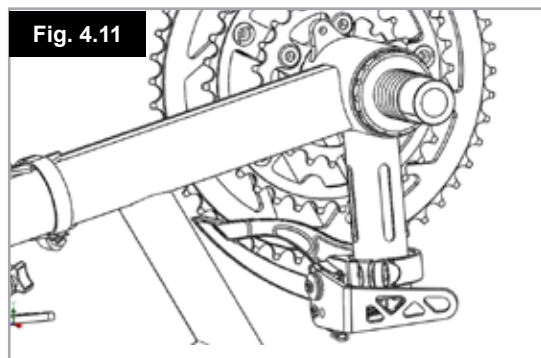


Fig. 4.12

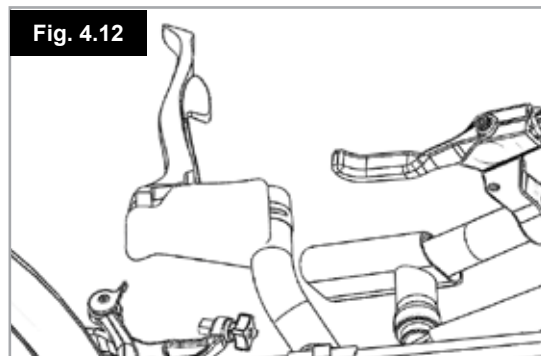

RT växel

Kedjeväxel / nav växel (Fig 4.10 -. 4.11)

Växling utförs med användning av Grip Shift reglaget, som kan monteras antingen på ramen, gaffeln eller handtaget.

Växling av de övre kedjehjulen utföres med användning av en reglaget som är monterad på vevarmen.

Kedjeväxeln gör det enkelt att hålla sig i rörelse, oberoende av andra vägförhållanden.

En beskrivning av växelenheten ingår som en del av leveransen. Om växeln plötsligt inte fungerar smidigt, kontakta din återförsäljare!

RS växel (Fig. 4.12)

Detta görs genom att använda reglaget på höger handtag eller Dual Control-knappen på högra sidan av gaffeln.

Ryggstödsjustering

Rygg justering (Fig 4.13 - 4.14)

Vid testsittning, säkerställ att vevarmarna roterar fritt över låren, även när man svänger. (Testa genom att veva bakåt, justera sittdynans tjocklek om det behövs). Ställ in avståndet från veven så att när du vrider på veven, sträcker sig armarna till ett bekvämt avstånd och kan böjas lätt. De allra bästa köregenskaper och körpositionen uppnås om du använder justeringsalternativ för ryggstödet och vevarmens höjd.

Justering av ryggstödet utförs på längden genom att släppa och flytta fästklämman. Justering av ryggstödsvinkeln utförs genom justering av höjden på det röret bakom ryggstödet.



VIKTIGT!

Efter att justeringen, dra åt alla skruvar. (se sidan om åtdragningsmoment)

Fig. 4.13

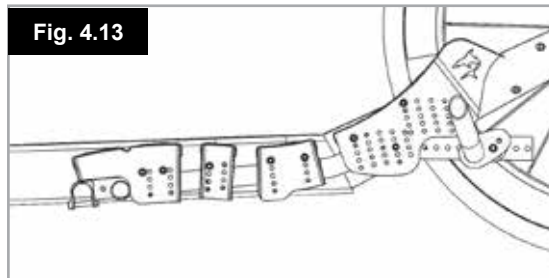


Fig. 4.14


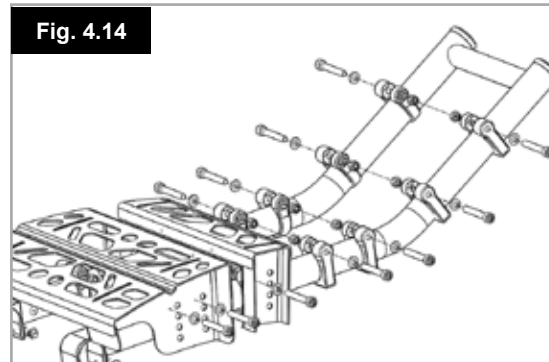


Fig. 4.15

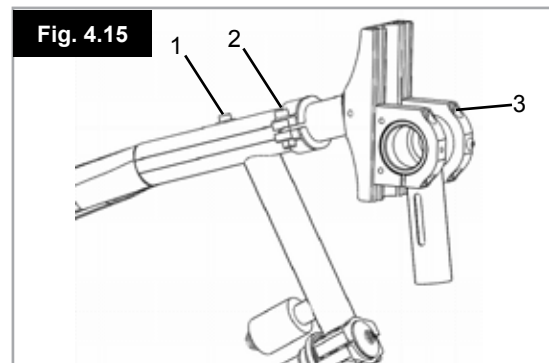

Höjd- och djupjusterbar gaffel

Diagonal justering (fig. 4.15)

Lossa insexskruvarna (1) på gaffelröret och muttrarna (2) på klämman. Skjut vevarmsfästet framåt eller bakåt.

När vevarmsfästet är i önskad position, kommer kedjespänningen inte vara korrekt, så för att korrigera spänningen MÅSTE kedjelänkar läggas till eller tas bort. Denna procedur bör utföras av en kvalificerad tekniker.

Slutligen, dra åt insexskruvarna som fixerar vevarmsfästet på gaffelfästet.

Vertikal justering

Lossa insexskruvarna (3) som fixerar vevarmen vid vevarmsfästet, men ta inte bort dem.

Flytta infästningen uppåt eller nedåt, tills du har uppnått det optimala läget för dig.

Dra åt skruvarna (3) för att fixera vevarmen i önskad position.

Återspänn kedjan vid behov.

Drivhjulsaxel

Drivhjulsaxel (Fig. 4.16 - 4.17)

Det finns 3 olika axlar, som var och en kan skruvas på ramen med hjälp av axelklämman.

Byt / ändra axeln:

Lossa de 3 fästskruvarna på vänster och höger axelklämman. Ta bort axeln och byt ut den. För att slutföra åtgärden, placera axelklämman på axeln igen och fäst den med de tre skruvarna. Dra åt de 3 skruvarna växelvis tills alla tre skruvar är fästa vid ett vridmoment på 5 Nm.

OBS: När du byter från aluminium till kolfiberrör, måste den excentriska hylsan också ändras.

Fig. 4.16


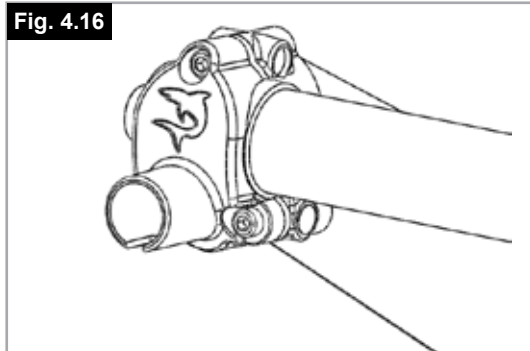


Fig. 4.17

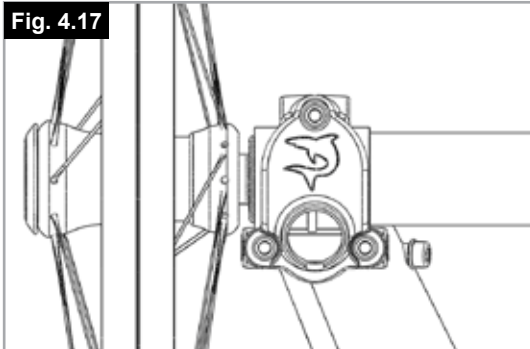

5.0 Underhåll och skötsel (kontrollera innan användning)

När	Vad	Kommentar
Var fjärde vecka (beroende på användningsfrekvens)	Smörj kablarna till växlar och bromshandtagen. Kontrollera alla skruvförband är säkra! Var 4:e vecka olja in kedjan! (beroende på användningsfrekvens)	Utför eller tillsammans med en assistent. Innan oljning, ta bort alla gamla oljerester från komponenterna. Se till att överskottsolja inte gör det omgivande området (t ex dina kläder) smutsiga. Utför själv eller med en assistent. Spraya lätt med teflonspray. Var noga med att inte få det på dina kläder!
Var 2-3:e månad (beroende på användningsfrekvens)	Kontrollera: • Hur smutsig den är • Allmänt skick	Utför själv eller med en assistent. Om det finns några sprickor eller allmänt slitage, förändring på gummidelar, byt delar eller besök en auktoriserad serviceverkstad för en renovering.

Service:

Om du har några frågor eller behöver hjälp, kontakta din återförsäljare, som gärna ger dig råd när det gäller service och reparation.

Beroende på hur mycket du har använt din Shark RS / RT, rekommenderar vi att du tar den till din återförsäljare var 6 månad, för att få din Shark RS / RT inspekterad av utbildad personal.

6.0 Däckunderhåll

Däck

Shark RS / RT är utrustad med speciella 26 " däck på bakhjulen och ett 26 " drivhjul. Se till att de alltid har rekommenderat däcktryck, eftersom detta avsevärt påverkar drivegenskaperna hos din Shark RS / RT. Om däcktrycket är för lågt, påverkas rörelse och manövrerbarhet till det sämre på grund av ökat rullmotstånd och detta ökar också mängden kraft som krävs.

Det optimala däcktrycket är tryckt på varje däck.

Montering och reparation av däck

Innan du installerar en ny innerslang: Inspektera basen av fälgen och däckets innervägg för främmande föremål och vid behov rengör ordentligt.

Kontrollera skicket på fälgband, särskilt i ventilhålet. Endast väl passande, starka fälgband erbjuder långsiktigt skydd mot innerslang skador genom grader och vassa delar.

Fylla luft:

Kolla runt på båda sidor, för att se till att innerslangen inte kläms mellan däckvulsten och fälgen. Skjut ventilen tillbaka försiktigt och dra tillbaka ut, så att det inre röret uppnår ett optimalt läge runt ventilen.

Slanglösa däck

Som tillval kan du få slanglösa däck med kolfiber-fälgar.

Med dessa, observera: att de måste limmas mot fälgen av en specialist.

Om du har en punktering, får du inte fortsätta att cykla (de omedelbara konsekvenserna är en ökad risk för olyckor och fälgen kommer att förstöras).



VIKTIGT!

Efter montering, kontrollera däcktrycket.

Det är viktigt att du behåller reglerat däcktryck och håller däcken i perfekt skick, för att säkerställa din personliga säkerhet och hålla din Shark RS / RT igång ordentligt.

7.0. Avfallshantering / Återvinning av material

OBS: Om du har fått handcykeln genom en välgörenhetsorganisation eller medicinska lånesystem, då kanske den inte tillhör dig. Om du inte längre är i behov av cykeln, följ instruktionerna för att lämna tillbaka den till den organisation som du fått handcykeln av.

I följande avsnitt, finns en beskrivning av de material som används på handcykel, med tanke på skrotning eller återvinning av handcykeln och dess förpackning.

Det kan också finnas särskilda lokala regler som gäller med avseende på skrotning eller återvinning, dessa ska tas med i beräkningen när du kasserar din handcykel. (Det kan handla om rengöring eller dekontaminering av handcykeln före omhändertagande).

Aluminium: Gafflar, hjul, fotstöd,

Stål: Fästpunkter,

Kolfiber: Bakaxel

Plast: Handtag, rör proppar, armstöd och däck

Förpackning: Tillverkad av mjuk polyeten, kartong

Klädsel: Vävd polyester med PVC-beläggningar och utökad förbränning modifierad skum.


Avfallshantering och återvinning bör ske genom en licensierad agent eller auktoriserad plats för bortskaffande. Alternativt kan din handcykel återlämnas till återförsäljaren för omhändertagande.



8.0 Märkskylt

Märkskylt

Märkskylten är placerad på antingen den bakre delen av ramen eller på ramen under sittytan, samt på en etikett i bruksanvisningen. Märkskylten anger den exakta modellbeteckningen och andra tekniska specifikationer. Ange följande bitar av information när du måste beställa reservdelar eller för att lämna in en ansökan: Eftersom vi är fast beslutna att ständigt förbättra byggandet av våra handcyklar, kan produktspecifikationer variera något från exemplen illustrerade.

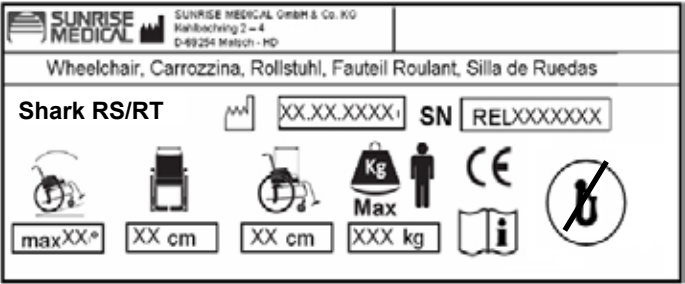

Shark RS/RT XXXXX-XXX	Produktnamn/SKU nummer
	Maximal säker lutning med tippskydd beror på inställningar på handcykeln, positionering och fysisk kapacitet hos brukaren
	Sittbredd
	Djup (maximum).
	Maximum vikt.
	CE märkning.
	Bruksanvisning
	ej krocktestad
	Tillverkningsdatum.
SN RELXXXXXXXX	Serienummer

Alla vikt / mått och prestandadata är ungefärlig och tillhandahålls endast för vägledning.
Alla produkter från Sunrise Medical följa 93/42 / EEG direktiv för medicinska produkter

Alla begagnade cyklar måste användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Sunrise Medical GmbH & Co.KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch / Heidelberg
Tyskland
Tel .: +49 (0) 7253 / 980-400
Fax: +49 (0) 7253 / 980-111
www.sunrisemedical.de

9.0 Åtdragningsmoment

Styrning huvudlager: Handkraft

Gaffel gaffelaggregat: 7 Nm

Skruva axel på drivhjulet: 10 Nm


Fotstöd klämskruvar: 7 Nm

Vevarm klämskruvar: 7 Nm

Främre ryggstöd klämskruvar: 7 Nm

Baksätets ryggstöd klämskruvar: 7 Nm

Åtdragningsmoment för M6 skruvar är 7 Nm, såvida annat anges.

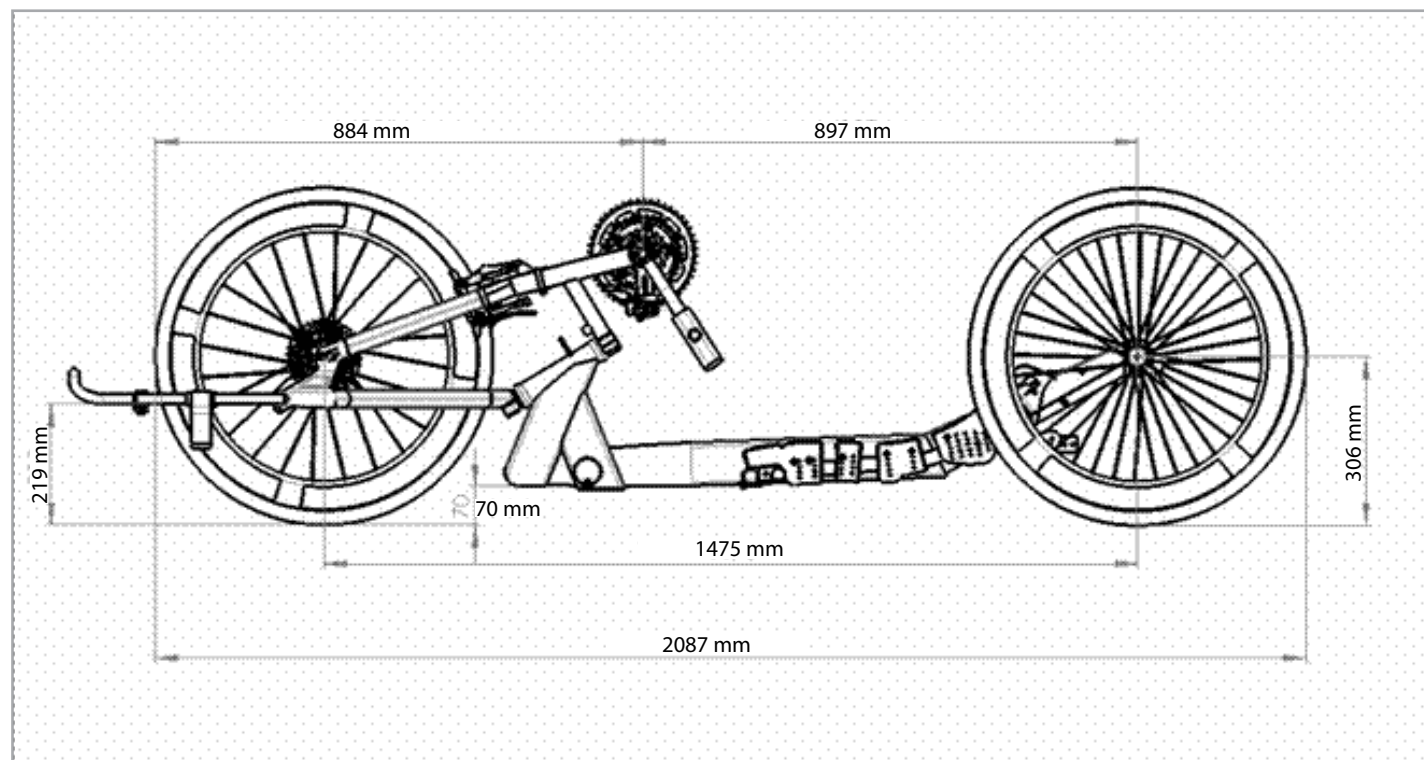



Sunrise Medical GmbH & Co.KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-111
www.SunriseMedical.com

Sunrise Medical Limited
High Street Wollaston
West Midlands DY8 4PS
England
Tel.: +44 (0) 1384446688
www.SunriseMedical.com

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
Spain
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.com

Sunrise Medical S.A.
13, Rue de la Painguetterie
37390 Chanceaux sur Choisille
France
Tel.: +33 (0) 247554400
Fax: +33 (0) 247554403
www.SunriseMedical.com

Sunrise Medical Srl
Via Riva 20, Montale
29100 Piacenza (PC)
Italy
Tel.: +39 0523-573111
Fax: +39 0523-570060
www.SunriseMedical.com

Sunrise Medical A.G.
Lückhalde 14
3074 Muri bei Bern
Switzerland
Tel.: +41 (0) 31-958-3838
Fax: +41 (0) 31-958-3848
www.SunriseMedical.com

Sunrise Medical AS
Dynamitveien 14B
1400 SKI
Norway
Tel.: +47 (0) 66963800
Fax: +47 (0) 66963838
www.SunriseMedical.com

Sunrise Medical AB
Britta Sahlgrens gata 8A
421 31 Västra Frölunda
Sweden
Tel.: +46 (0) 31-748 37 00
Fax: +46 (0) 31-748 37 37
www.SunriseMedical.com

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Netherlands
Tel.: +31 (0) 30 - 6082100
Fax: +31 (0) 30 - 6055880
www.SunriseMedical.com

G2 A/S
Graham Bells Vej 21-23 A
8200 Aarhus N
Denmark
Tel.: +45 87 41 31 00
Fax: +45 87 41 31 31
www.G2.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
Unit 10/15 Carrington Road
Castle Hill,
New South Wales 2154
Australia
Tel: (+61) 2 8858 9191
Fax: (+61) 2 8850 4711
www.SunriseMedical.com