

XENON²

DIE NEUE GENERATION
DES LEICHTESTEN
FALTROLLSTUHLS AUF DEM MARKT



SOPUR XENON² – HÖCHSTE RAHMENSTABILITÄT BEI LEICHESTEM GEWICHT

Entdecken Sie seine einzigartige Faltbarkeit
und energieeffiziente Fahrweise.

Minimales Gewicht (ab 8,8 kg) vereint mit edlem Design,
hoher Funktionalität und Stabilität - dafür stehen die Xenon²
Faltrollstühle. Ob Xenon² mit festem Vorderrahmen, Xenon² Hybrid
mit zusätzlichen Rahmenrohren für extrem hohe Stabilität oder
Xenon² SA mit wegschwenkbaren Fußrasten
für mehr Bewegungsfreiheit – mit jedem Xenon² stehen
Sie im Mittelpunkt.



→ **Rahmenfarbe**
32 Signal Weiß

← Die abgebildeten Rahmenfarben können vom Original abweichen.

XENON² DER ULTRALEICHTE

Der leichteste Faltrollstuhl auf dem Markt mit einem offenen, festen Vorderrahmen besitzt die Fahrperformance eines Starrrahmens. Perfekt für ein aktives Leben und als Partner der ATTITUDE Handbikes. Maximale Zuladung bis 110 kg.



XENON² HYBRID DER KRAFTVOLLE

Durch einen verstärkten Vorderrahmen und **zusätzlichen Rahmenrohren**  bietet er ein Maximum an Stabilität und eine erhöhte Zuladung bis 140 kg. Der Xenon² Hybrid ist der perfekte Partner für unsere ATTITUDE Handbikes.



XENON² SA DER VIELSEITIGE

Die wegschwenkbaren Fußrasten ermöglichen einen einfachen und sicheren Transfer in und aus dem Rollstuhl. Durch sein kompaktes Faltmaß und das geringe Gewicht ist eine Mitnahme im Auto leicht möglich. Maximale Zuladung bis 125 kg.



DER LEICHTESTE FALTROLLSTUHL AUF DEM MARKT...

Wie entwickelt man einen ultraleichten, faltbaren Rollstuhl mit nur 8,8 kg? Durch den Einsatz von hochwertigem Aluminium aus der Luftfahrttechnik und der innovativen Hydroforming-Technologie, die Sunrise Medical als einziger Rollstuhlhersteller in der Produktion verwendet.

Mit Hilfe dieser einzigartigen Fertigungstechnologie werden die Rahmenrohre oval geformt – dies garantiert eine höhere Festigkeit bei gleichzeitig reduziertem Gewicht! Gewichtsersparnis, die Sie spüren können: 8,8 kg gepaart mit einer steifen Rahmenkonstruktion sorgen für leichteres und effizienteres Antreiben des Rollstuhls. Minimales Gewicht vereint mit modernem Design, hoher Funktionalität und Rahmenstabilität für eine direkte Kraftübertragung!

→ JAY Lite Sitzkissen

Federleicht und besonders atmungsaktiv – damit ist das JAY Lite ideal geeignet für aktive Rollstuhlnutzer, die hohe Druckentlastung und Positionierung benötigen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.sunrisemedical.de/produkte/jay/rollstuhl-sitzkissen/lite.aspx





... MIT EINZIGARTIGER FALTPERFORMANCE

Das Herzstück des Xenon² ist die überarbeitete Kreuzstrebe. Sie liegt so flach unter dem Sitz, dass sie von außen kaum sichtbar ist. Durch den neuen Mechanismus verringert sich auch das Faltmaß des Rollstuhls um 20 Millimeter.

Mit diesen Weiterentwicklungen ermöglicht ein noch steiferer Rollstuhlrahmen höchste Stabilität, selbst bei extremen Anforderungen. Der Xenon² – Ein Faltrollstuhl mit der Fahrperformance eines Starrrahmens.

Auch der von Grund auf neu entwickelte Achsträger bietet Ihnen jetzt eine einfache Höheneinstellbarkeit über einen weiten Einstellbereich. Die hintere Sitztiefe kann nun individuell über 11 cm angepasst und eingestellt werden. Für weniger Gewicht und einen einfacheren Transport kann der Achsträger auch entsprechend Ihrer gewünschten Sitzhöhe abgelängt werden! So passt sich der Xenon² perfekt Ihren Bedürfnissen an!

→ Einfacher Faltmechanismus

Die neuen Aluminium-Laschen an der Kreuzstrebe fixieren die Räder im gefalteten Zustand genau parallel nebeneinander, sodass Ihr Xenon² stabil stehen bleibt. Zudem erleichtert die patentierte, automatische Faltfixierung von Sopur das Verladen des Adaptivrollstuhls: Einfach zusammenfallen und los geht's.






32 FARBEN, ENORME KOMBINATIONSVIELFALT

Ein besonderes Highlight bietet die extrem große Farbpalette: Personalisieren Sie Ihren Xenon² indem Sie aus 32 stylischen Rahmenfarben, fünf eloxierten Farben für Lenkradgabeln und Lenkräder (Blau, Rot, Silber, Orange, Schwarz) sowie fünf Einfassbänder-Farben der neuen EXO / EXO Pro Rückenbespannung (Blau, Rot, Silber, Orange, Schwarz), Ihren eigenen unverkennbar individuellen Xenon² kreieren.

→ Gestalten Sie Ihren eigenen Highlight-Rollstuhl mit einer Auswahl von 32 stylischen Farben.

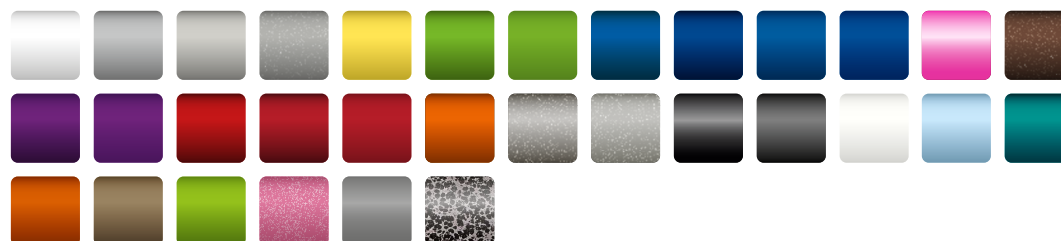

” **Yeray Betancor:** Ich suchte einen Rollstuhl für ein aktives Leben. Er sollte leicht, modern, faltbar und mit nur einer Hand einfach ins Auto zu verladen sein – der SOPUR Xenon² erfüllt alle meine Anforderungen.



→ **Neue EXO und EXO Pro Rückenbespannungen**

Bringen Sie Farbe ins Spiel mit den innovativen, atmungsaktiven EXO und EXO Pro Rückenbespannungen, die in fünf verschiedenen Einfassbänder-Farben erhältlich sind.



→ **Wählen Sie Ihre Farbe**

Die eloxierten Lenkradfelgen und Lenkradgabeln sind in fünf stylischen Farben erhältlich, ebenso die eloxierten Leichtgewichtsräder.



” **Yeray Betancor:** Da ich schon immer ein aktiver und dynamischer Typ war, passt der SOPUR Xenon² perfekt zu mir und ist mein treuer Begleiter, jeden Tag.

GROSSZÜGIGE EINSTELLMÖGLICHKEITEN GANZ NACH BEDARF

Genau so, wie es sein sollte – entwickelt um sich Ihren verändernden Bedürfnissen anzupassen, daher sehr gut geeignet für Erstversorgungen! Der überarbeitete Achsträger des Xenon² bietet eine einfache Höheneinstellbarkeit.

Oder möchten Sie Ihre Fahreigenschaften vom passiven zu einem aktiven Fahrerlebnis ändern? Dann korrigieren Sie einfach Ihre Schwerpunkteinstellung durch die leichte Neupositionierung des Achsträgers. Vergessen Sie nicht, den Rollstuhlrückwinkel für eine ergonomische Sitzposition einzustellen.
Tipp: Bei Verwendung des Leichtgewichtsadapters werden bis zu 500 g Gewicht eingespart.

❶ Schwerpunkteinstellung

Ermöglicht die Änderung der Fahreigenschaft von sehr aktiv bis hin zu sehr passiv.

❷ Rückenwinkleinstellung

Die richtige Rückenwinkleinstellung ist sehr wichtig für eine gesunde, ergonomische Körperhaltung.

❸ Hintere Sitzhöhe

So genau, wie möglich – einfach die hintere Sitzhöhe an Ihre Bedürfnisse anpassen.



Optionen und Funktionen der Sopur Xenon² - Familie – konfigurieren Sie den Rollstuhl nach Ihren ganz individuellen Bedürfnissen. Weitere Informationen zu den Produktoptionen entnehmen Sie bitte dem interaktiven Xenon² und Xenon² SA Bestellformular auf unserer Homepage.



// HALBFALTENDER ROLLSTUHLRÜCKEN

Neuer, nach vorne halbfaltender Rücken, für ein nochmals verringertes Packmaß und einen einfacheren Transport.



// SURGE® LT GREIFREIFEN

Der Gripton Gummistreifen auf der Oberseite der ergonomischen, oval geformten Greifreifen bietet maximale Traktion.



// RÜCKENWINKELEINSTELLUNG

Neu entwickelte, beidseitige Befestigung der Rückenrohre sorgt für steifere und spielfreie Anbindung der Rückenlehne. Rückenwinkel von 75 ° bis 103 ° in 4 ° Schritten einstellbar.



// DESK-SEITENTEIL

Das stabile, hochklappbare und abnehmbare Seitenteil kann mit festen oder höhenverstellbaren Armlehnen bestellt werden.



// GEPOLSTERTE, RÖHRENFÖRMIGE ARMLEHNE

Die wegschwenkbaren Armlehnen geben Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen und schränken Sie in Ihrer Bewegungsfreiheit nicht ein.



// LEICHTES CARBON-SEITENTEIL

Sehr individuelles und leichtes Seitenteil mit einzigartigem Look.



// AUTOMATISCH FALTENDE FUSSRASTE

Die Fußraste ist winkel- und tiefenverstellbar. Erhältlich in 5 Varianten in Composite, Aluminium und Carbon. Verfügbar für feste Vorderrahmen-Versionen.



// BEFESTIGUNGSÖSEN FÜR TRANSPORT IM AUTO

Mit dieser Option sind alle Xenon² Faltrollstühle für den Transport eines Rollstuhls als Sitz in einem Fahrzeug zugelassen (Crash-getestet nach ISO 7176 -19).

DIE TEAMPARTNER DES XENON²

DIE ATTITUDE HANDBIKES



ATTITUDE

- Einfacher An- / Abklemmmechanismus
- Mit manuellem Antrieb und/oder elektrischer Unterstützung
- Beeindruckend kleiner Wendekreis



In Verbindung mit dem Xenon² (mit festem Vorderrahmen) und dem Xenon² Hybrid sind die ATTITUDE Handbikes ohne Rahmenversteifung zugelassen.



→ Weitere Informationen finden Sie hier und auf unserer Homepage www.SunriseMedical.de

→ ATTITUDE Manual

Das kraftvolle Trainings-Bike!



→ ATTITUDE Hybrid

Das E-Bike für den Rollstuhl!



→ ATTITUDE Power

Das leistungsstarke Zuggerät!



TECHNISCHE DATEN

	Xenon ²	Xenon ² Hybrid	Xenon ² SA
Max. Nutzergewicht:	110 kg	140 kg	125 kg
Sitzbreite:	32 – 46 cm	32 – 50 cm	32 – 50 cm
Sitztiefe:	34 – 50 cm	34 – 50 cm	34 – 50 cm
Vordere Sitzhöhe:	43 – 55 cm	43 – 55 cm	43 – 56 cm
Hintere Sitzhöhe:	37 – 50 cm	37 – 50 cm	37 – 50 cm
Rückenhöhe:	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm
Rückenwinkel:	75° – 103° in 4° Schritten	75° – 103° in 4° Schritten	75° – 103° in 4° Schritten
Radsturz:	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°
Rahmenvariante:	Offener Rahmen mit festem Vorderrahmen	Verstärkter Rahmen mit festem Vorderrahmen	Verstärkter Rahmen mit wegschwenkbarer Fußraste
Rollstuhlgewicht:	ab 8,8 kg	ab 9,5 kg	ab 10,3 kg
Rahmenfarben:	32	32	32
Crash-getestet:	ja	ja	ja

Weitere Informationen zu den kompletten technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular.

Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.

Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.de zur Verfügung oder es ist auch im Großdruck erhältlich.



MADE IN
MALSCH/GERMANY



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten

000690957/2000/Sonnendruck/0618