



Manuel d'utilisation



Merci

d'avoir choisi RGK...


Nous espérons que le produit et le service que vous avez reçus vous donneront entière satisfaction. Prenez le temps de lire les instructions contenues dans le présent manuel pour vous familiariser avec votre nouveau fauteuil RGK et pour profiter d'une performance et d'une longévité optimales.



Russel Simms,
Directeur commercial

AVERTISSEMENT !

Lisez impérativement ce manuel avant d'utiliser votre équipement. En cas de doute concernant les avertissements ou les instructions, contactez votre professionnel de santé (médecin ou thérapeute) avant d'utiliser ce matériel pour éviter tout risque de blessure ou d'endommagement.

 En sa qualité de fabricant, RGK Wheelchairs, déclare que les fauteuils sont conformes à la directive 93/42/CEE telle que modifiée par 2001/47/CEE.

Pour toute question concernant l'utilisation, la maintenance ou la sécurité de votre fauteuil roulant, n'hésitez pas à contacter RGK ou votre revendeur RGK agréé.

RGK Wheelchairs, Units 8a/b/c , Ring Road, Zone 2 ,
Burntwood Business Park, Burntwood, Staffordshire, WS7
3JQ, Royaume-Uni
info@rgklife.com

Sommaire

3	À propos / Compatibilité	7	Installation complète
3	Fauteuils RGK compatibles	7	Assemblez votre roue FrontWheel
4	Consignes de sécurité	7	Installation du crochet des repose-pieds
4	Avertissements généraux	8	Positionnement du collier de serrage
5	Récapitulatif roue FrontWheel	11	Guide de démarrage
6	Fonctionnement	11	Serrage au châssis
6	Verrouillage roue FrontWheel en position haute	13	20-35 mm
6	Verrouillage de la roue FrontWheel en position abaissée	13	Déverrouillage du châssis

À propos / Compatibilité

La roue FrontWheel est un accessoire en supplément permettant de rendre le fauteuil mieux adapté aux situations de tous les jours, notamment pour traverser facilement l'herbe, les graviers, la boue, le pavé, et autres terrains accidentés, en maintenant constamment les roues avant hors du sol, quelle que soit la direction empruntée, y compris en marche arrière.

AVERTISSEMENT !

Maximum : 125 kg

Fauteuils RGK compatibles

- RGK TIGA
- RGK TIGA FX

Certaines personnalisations et options de châssis empêchent l'installation de la roue FrontWheel. Veuillez demander un test de compatibilité pour faire vérifier votre fauteuil.

Consignes de sécurité

Avertissements généraux

Pour vous familiariser le plus rapidement avec votre roue supplémentaire, lisez attentivement le Manuel d'utilisation. Il garantit votre sécurité et une bonne utilisation de votre roue supplémentaire.

AVERTISSEMENT !

Respectez les avertissements et les conseils de sécurité, Pour éviter tout risque d'endommagement ou d'accident.

REMARQUE :

Pensez à transmettre le manuel d'utilisation à toute personne susceptible d'utiliser activement ou passivement votre fauteuil roulant.

AVERTISSEMENT !

Système d'attache et système de retenue.

- La roue supplémentaire est un accessoire pour fauteuil roulant et se doit d'être adaptée à chaque fauteuil.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du matériel ou de blessure corporelle résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une modification technique de la roue supplémentaire.
- Le montage de la roue supplémentaire doit être exclusivement entrepris par une personne autorisée ayant été formée à cet effet. Il convient par ailleurs de respecter le manuel d'utilisation.
- Seul l'ensemble complet des composants modifiés par un spécialiste pour être adaptés au fauteuil, doit être utilisé.
- La roue supplémentaire est destinée exclusivement aux personnes physiquement aptes à la manipuler et ayant pris connaissance du manuel d'utilisation.
- La roue supplémentaire ne doit être utilisée que sur les surfaces appropriées et à une vitesse maximale de 10 km/h.

DANGER !

- Un réglage incorrect de la roue avant peut avoir un effet négatif sur le point de basculement du fauteuil et entraîner une chute vers l'arrière si l'utilisateur ne maîtrise pas complètement le fauteuil.

Risque de blessure.

- Changer la toile du dossier ou la position du montant du dossier peut avoir un effet négatif ou positif sur l'angle de basculement, du fait que la position d'assise passive a été modifiée.
- Le point de basculement idéal doit être déterminé en fonction de l'usage principal qui est fait du fauteuil roulant.

AVERTISSEMENT !


- Lorsque vous vous déplacez à bord d'un fauteuil équipé d'une roue supplémentaire, vous pouvez aller un peu plus vite.
- Faites toujours très attention lorsque vous êtes en pente.
- Si vous freinez sur une longue distance à l'aide de la main courante, veillez à ne pas vous brûler.
- N'abordez jamais une pente si vous ne maîtrisez pas le fauteuil.
- Vous pourriez tomber et vous blesser.

ATTENTION !


Vérifiez les vis régulièrement pour vous assurer qu'elles sont bien serrées. Resserrez-les si nécessaire.

Récapitulatif roue FrontWheel

- A Crochet de repose-pied
- B Levier de déverrouillage
- C Cliquet de verrouillage
- D Levier de blocage
- E Plaque de maintien
- F Crochet du fauteuil
- G Plaque du crochet

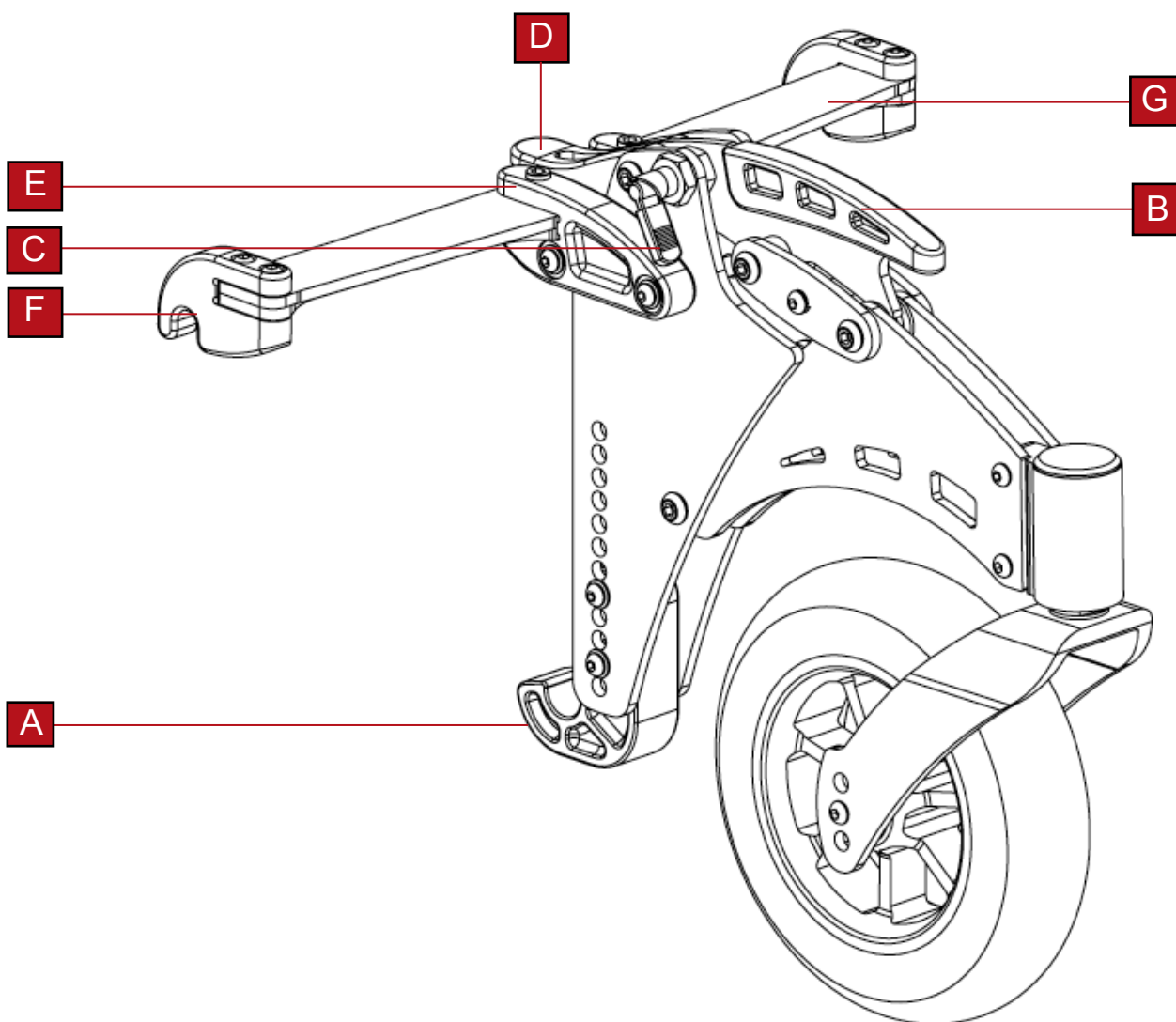


Fonctionnement

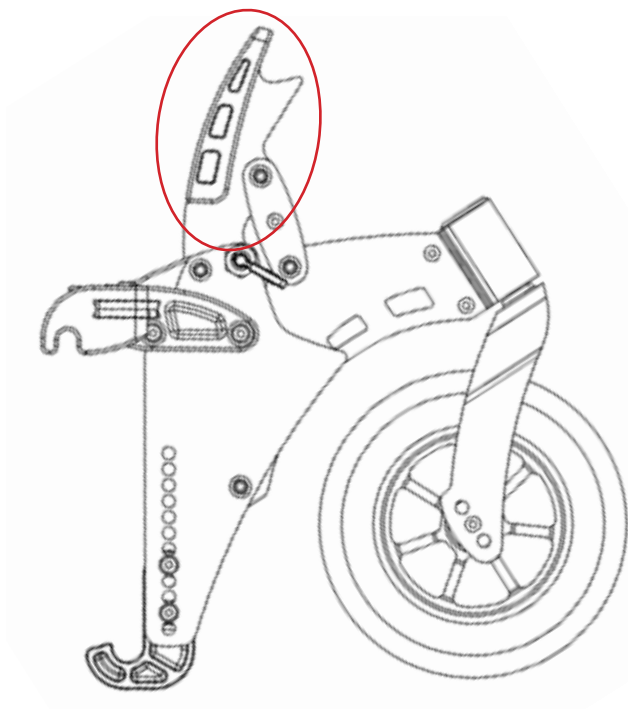

Verrouillage roue FrontWheel en position haute

Pour ce faire, tirez le levier de déverrouillage de la roue FrontWheel (entouré) jusqu'au clic d'enclenchement en position. Une fois la manœuvre terminée, la roue FrontWheel prendra cette apparence.

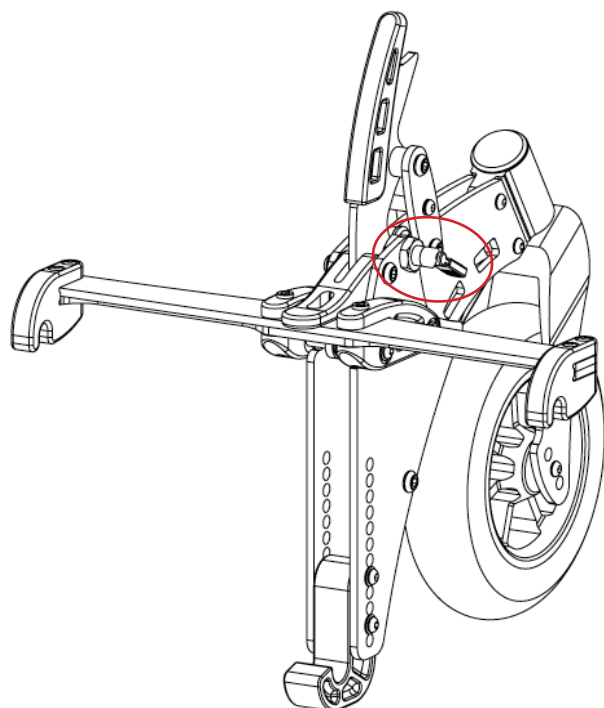

Verrouillage de la roue FrontWheel en position abaissée

Pour ce faire, tirez le cliquet de verrouillage (entouré) et l'avant de la roue s'abaissera et se verrouillera en position abaissée.

REMARQUE :

Si votre roue FrontWheel est entièrement installée et les colliers de serrage ont été placés sur votre fauteuil dans les locaux de RGK, poursuivez en section Démarrage rapide. Si ce n'est pas le cas, vous devez les placer vous-même. Dans ce cas, commencez par la section Installation complète.


Installation complète

Si votre roue FrontWheel a été correctement installée dans les locaux de RGK, passez les étapes d'installation suivante, et poursuivez directement en section **Démarrage rapide**.

Assemblez votre roue FrontWheel

Prenez les deux boulons, rondelles à ressort et écrous à filetage des deux supports à l'arrière de la roue FrontWheel, puis posez la plaque du crochet à l'intérieur des crochets.

Alignez les orifices des supports aux orifices de la plaque et placez cette dernière à l'aide de deux boulons comme illustré à gauche.

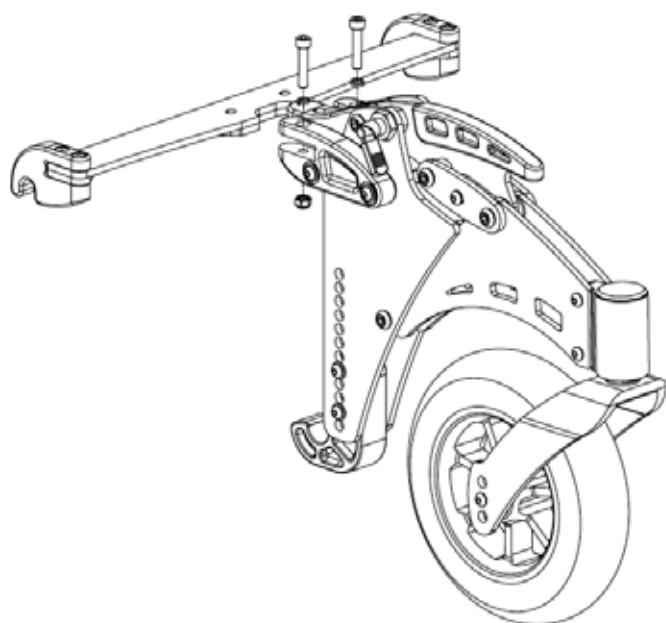

⚠ AVERTISSEMENT!


Vérifiez que les boulons sont bien serrés avant utilisation.

Installation du crochet des repose-pieds


Ne suivez cette étape que si vous avez ajusté la hauteur du repose-pied à la commande.

Vous pouvez au choix abaisser ou relever le crochet du repose-pied comme sur l'illustration.

- Si vous avez rehaussé le repose-pied, rehaussez le crochet
- Si vous avez abaissé le repose-pied, abaissez le crochet

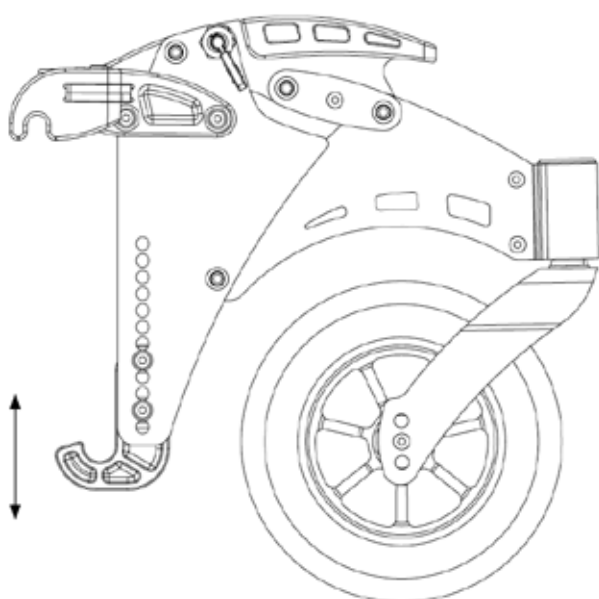


Suite à la page suivante >

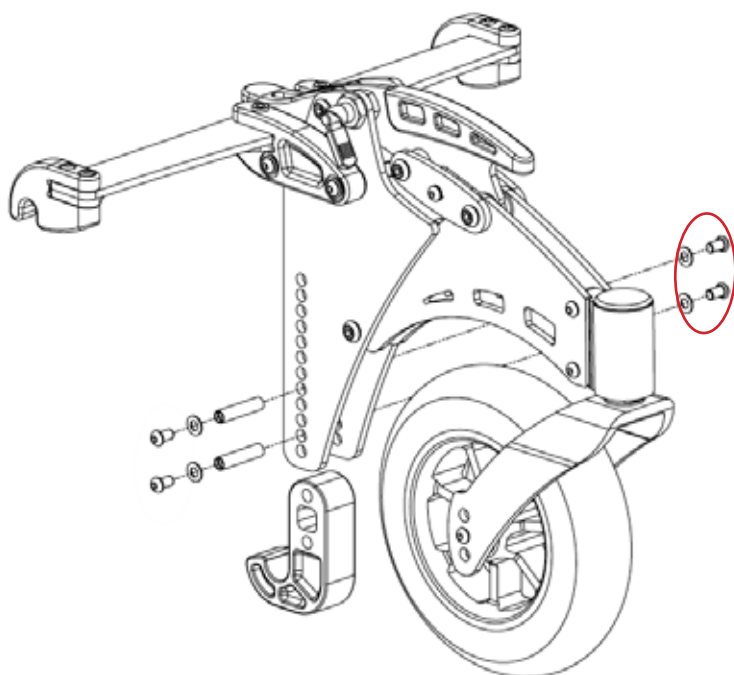


Suite de la page précédente >

Pour ce faire, retirez simplement les boulons entourés de la roue FrontWheel et faites sortir les axes. Cela permettra le retrait du repose-pied et sa remise en position adéquate. Reportez-vous aux illustrations de gauche. Refaites glisser les axes à travers la roue FrontWheel et le crochet du repose-pied et resserrez les boulons vers le haut. **Vérifiez que les boulons sont serrés avant utilisation.**

Positionnement du collier de serrage

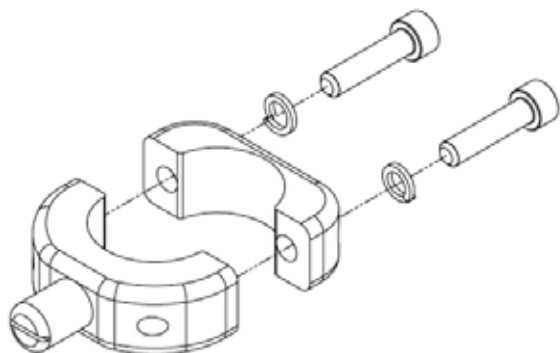


Prenez les colliers de serrage fournis et déboulonnez-les comme montré, pour pouvoir les fixer au châssis avant du fauteuil.

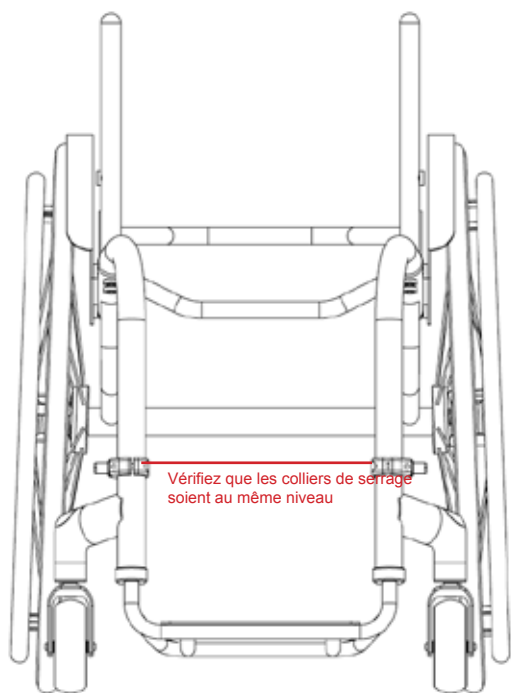

Placez les fixations de sorte que les ergots en acier poli soient orientés vers l'extérieur. Serrez de manière à pouvoir les monter ou descendre le long du montant.

Suite à la page suivante >

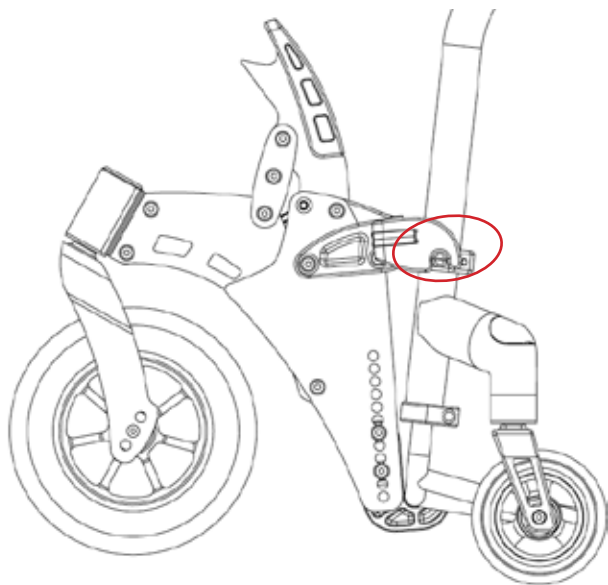

Suite de la page précédente >


Par la suite :

Verrouillez la roue en position rehaussée et placez le crochet du repose-pied sous ce dernier.


Ajustez à présent les positions des colliers de serrage sur châssis avant du fauteuil pour que la FrontWheel soit bien serrée autour du repose-pied et des cosses d'acier, comme sur l'illustration de gauche.

Une fois dans cette position, la roue FrontWheel devrait être hors de contact du sol. Si ce n'est pas le cas, le crochet du repose-pied doit être ajusté en fonction.

En l'absence d'espace, abaissez le crochet du repose-pied.

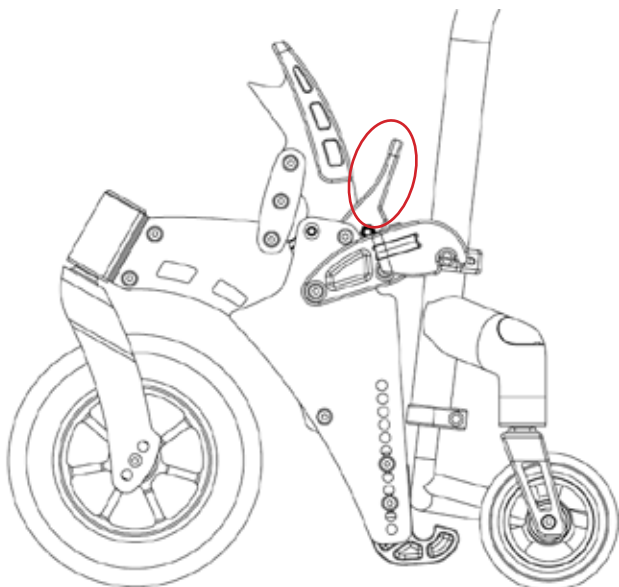


Retirez ensuite la roue avant. Pour cela, levez le levier de la fixation.

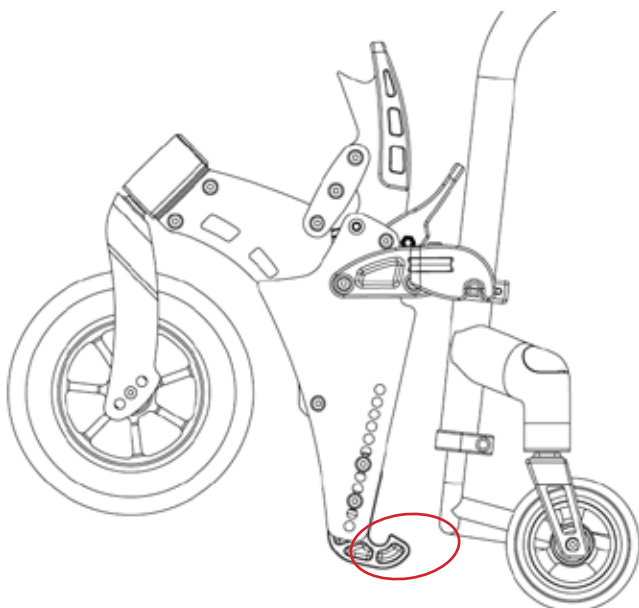

Faites osciller le crochet du repose-pied en dessous de ce dernier et relevez les cosses d'acier.

Suite à la page suivante >

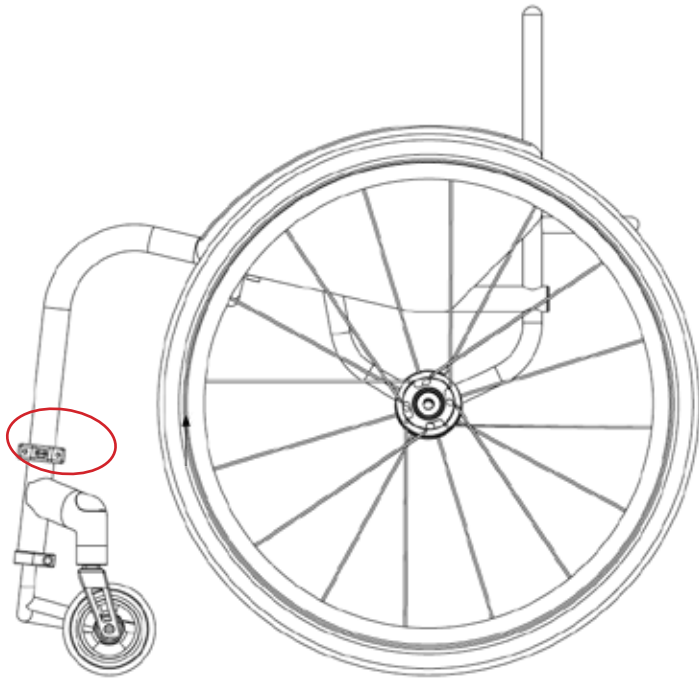


Suite de la page précédente >

Remontez les fixations de 5 mm, puis serrez les boulons au couple de 15 Nm. Cela permet un positionnement plus serré de la roue avant.


Une fois les colliers de serrage en position adéquate, poursuivez en section Démarrage rapide.

Guide de démarrage

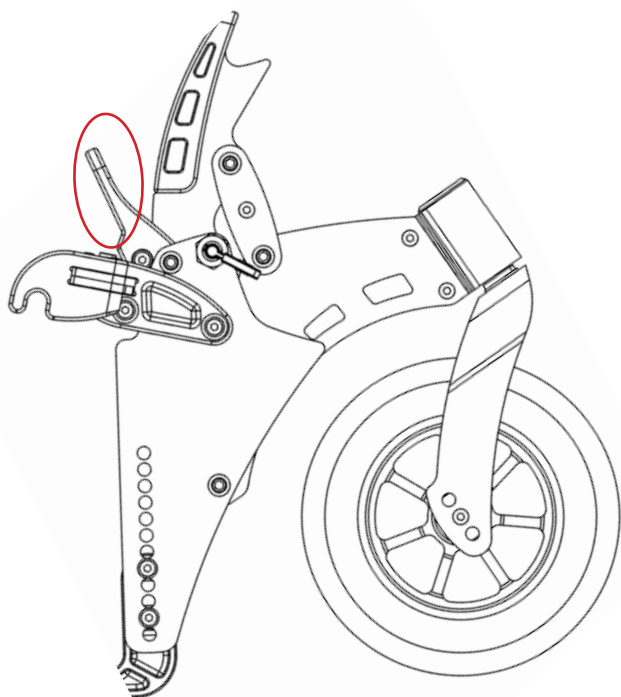


Serrage au châssis

Pour ce faire, la roue FrontWheel doit être verrouillée vers le haut. Pour la verrouiller, tirez le levier de déverrouillage vers le haut jusqu'au clic. Le levier de blocage doit lui aussi être levé (entouré). Une fois cette tâche effectuée, votre roue FrontWheel ressemblera à cela.

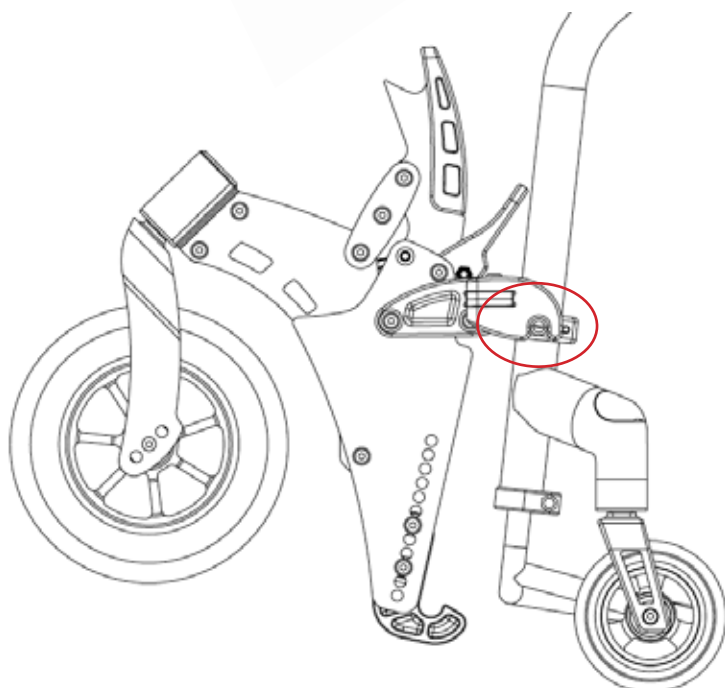


À présent, placez les crochets de la roue FrontWheel au-dessus des cosses d'acier poli.

Suite à la page suivante >

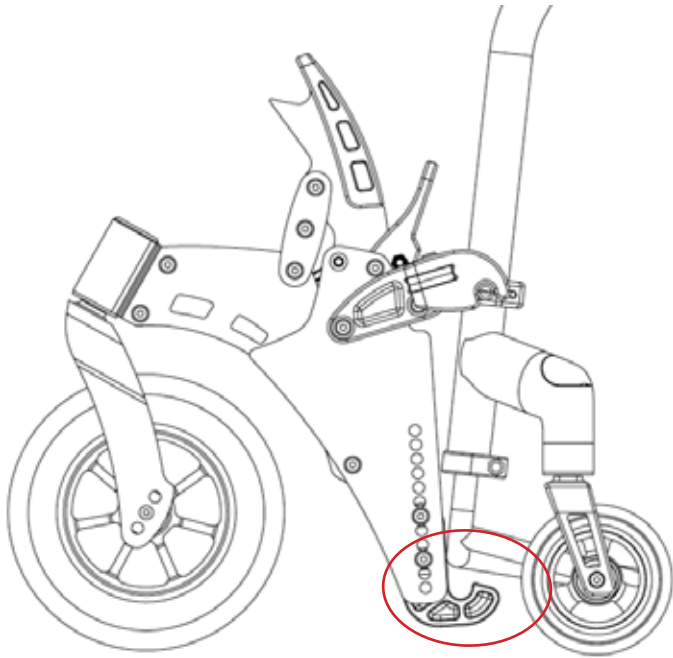

Suite de la page précédente >

Laissez le crochet du repose-pied s'accrocher en dessous du repose-pieds de votre fauteuil.

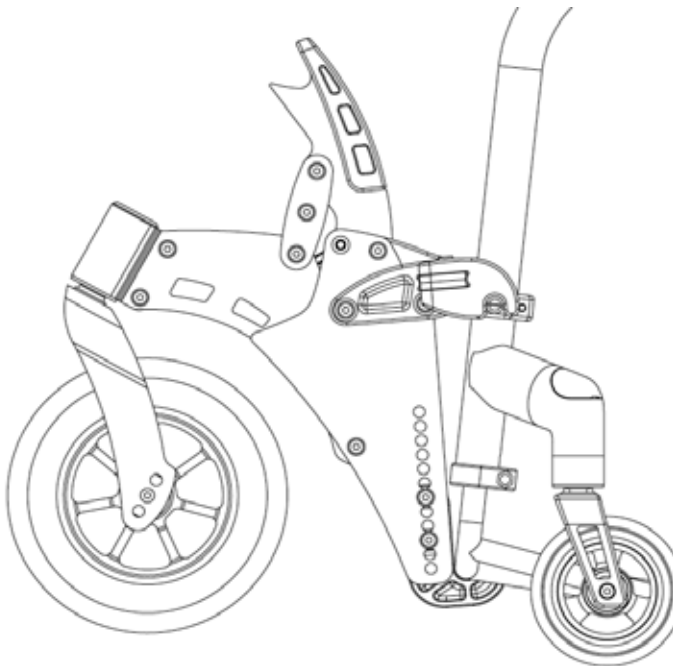


Pour verrouiller la roue FrontWheel en place, appuyez sur le levier de blocage jusqu'à ce qu'il touche la plaque du crochet.

Votre roue FrontWheel devrait être maintenant fermement en place devant le fauteuil, et hors du sol.

Vous pouvez à présent verrouiller la roue FrontWheel vers le bas en tirant le cliquet de déverrouillage de côté, ce qui permettra à la roue de toucher le sol. Pour un verrouillage en position, deux possibilités :


1. Tirez un petit cabré permettant le levage hors du sol des roues pivotantes du fauteuil. En ce faisant, la roue FrontWheel baissera et se verrouillera en place, les roues pivotantes maintenues hors du sol.
2. Appuyez sur le levier de déverrouillage jusqu'à le placer dans la butée plastique et les roues avant hors du sol.

Suite à la page suivante >

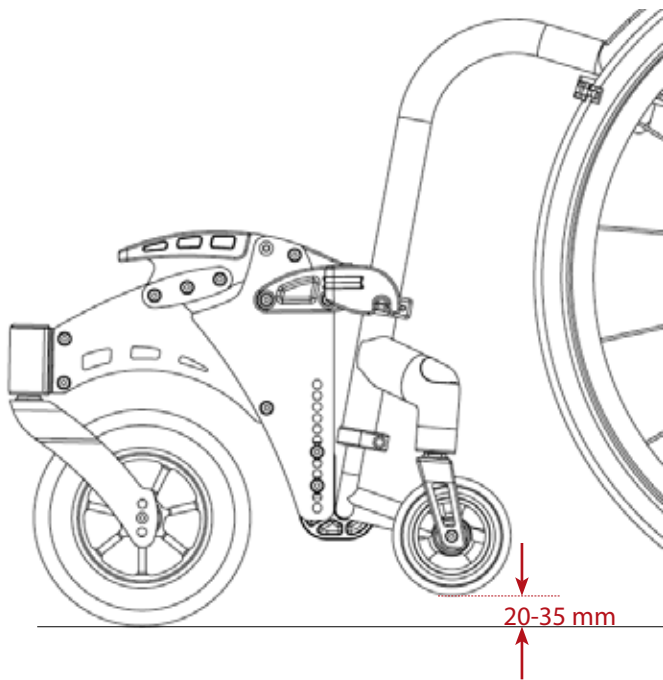

Suite de la page précédente >

Une fois cette manœuvre effectuée, le fauteuil devrait être comme sur le diagramme de gauche, les roues avant à 25-35 mm au-dessus du sol.

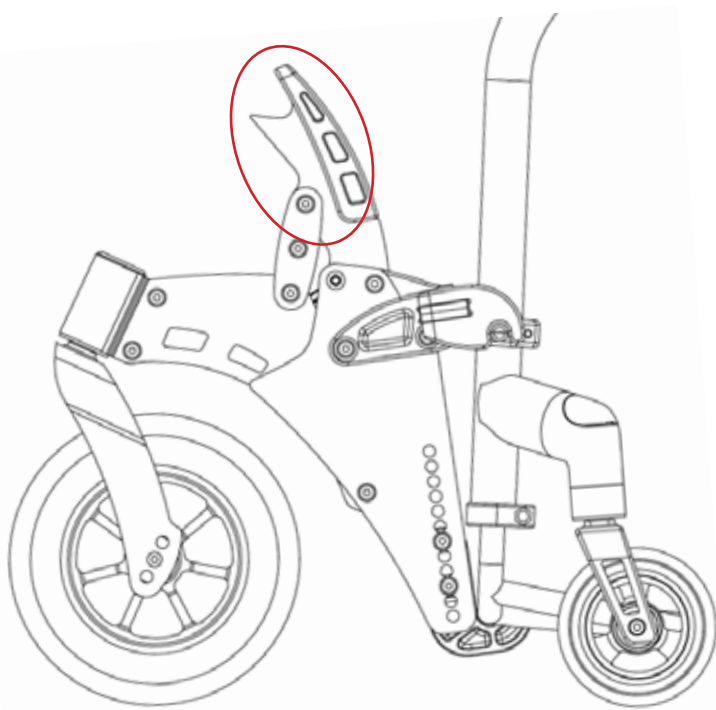


Déverrouillage du châssis

Pour ce faire, la roue FrontWheel doit être verrouillée vers le haut, en tirant le levier de déverrouillage vers le haut jusqu'au clic en position. En ce faisant, vous verrez les roues avant tomber au sol.


Suite à la page suivante >

Suite de la page précédente >

À présent levez le levier de blocage, ce qui fera tomber le crochet du repose-pied en dessous de ce dernier.

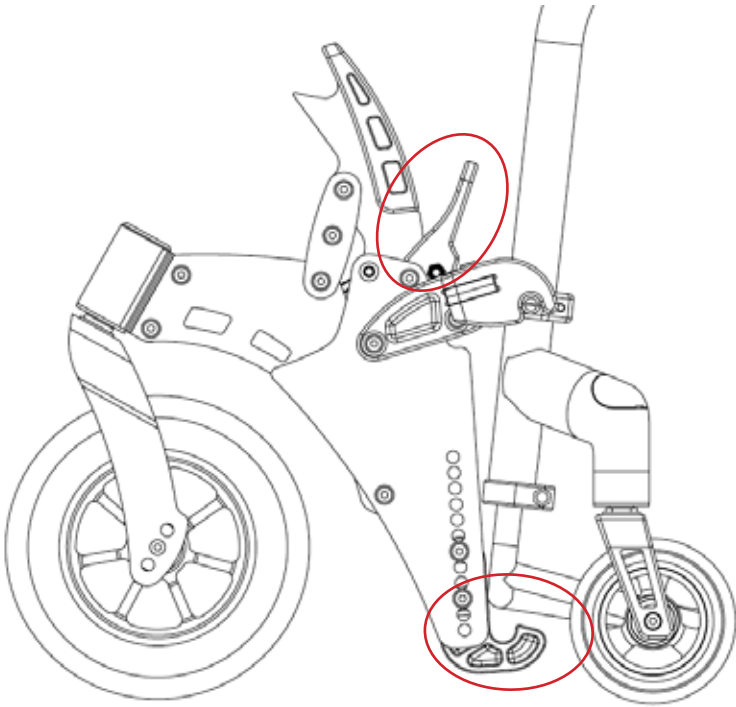

Faites pivoter le crochet du repose-pied du dessous de ce dernier, ce qui permettra de relever la roue FrontWheel, hors des cosses d'acier poli.

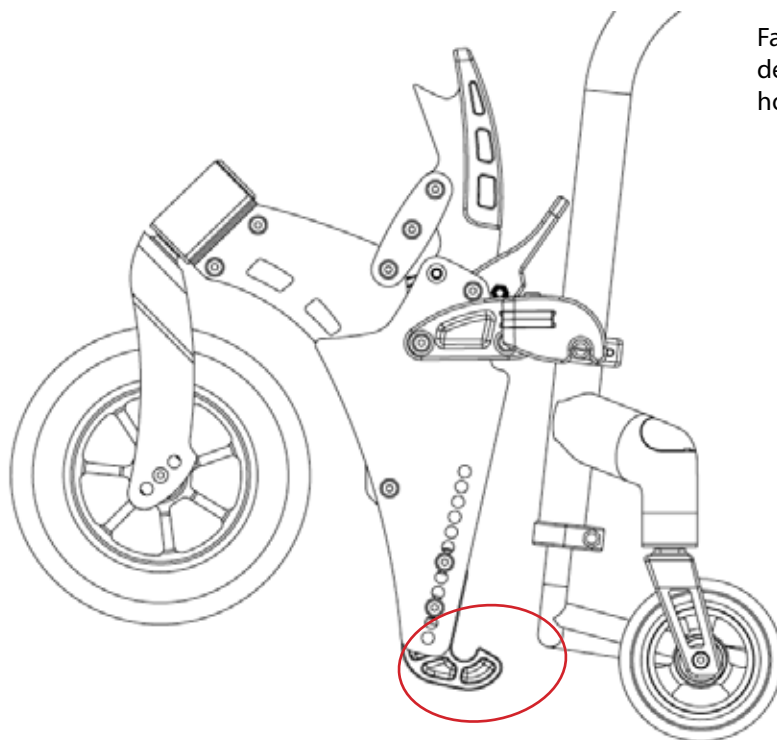

Dépannage

Quand elle est serrée au fauteuil, en position verrouillée vers le haut, ma roue FrontWheel touche le sol.

Dans ce cas, essayez de baisser d'un cran le crochet du repose-pied de la FrontWheel. En ce faisant, vous constaterez que les colliers du châssis devront également être rehaussés.

Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
Tel: +46 (0)31 748 37 00
Fax: +46 (0)31 748 37 37
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
625 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
Tlf. 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk

PT-keskus Oy,
Koivuhaantie 2-4, 01510 Vantaa,
Suomi
Puh 020 7912 740
Fax 020 7912 759,
ptkeskus@ptkeskus.fi

Türkiye Tek Yetkili Temsilcisi - İthalatçı -
Yetkili Servis İstasyonu:
Destek Rehabilitasyon Teknolojileri Ltd.
Şti.
Cevizlidere Mah., Gökkuşuğu Cad.,
No:23/B, Balgat,
Çankaya – Ankara
Tel: (312) 430 0900
info@destek-r.com.tr

Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood, NSW
2148,
Australia
Phone: 9678 6600,
Orders Fax: 9678 6655,
Admin Fax: 9831 2244.
Australia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
3074 Muri/Bern
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Dynamitveien 14B
1400 SKI
Norway
Telef: +47 66963800
Faks: +47 66963880
www.SunriseMedical.no

Adresse du siège social ...



Unit 8 A/B/C Ring Road Zone 2,
Burntwood Industrial Estate,
Burntwood, Staffordshire, WS7 3JQ

- ▶ Tél : +44(0)1543 670 077
- ▶ Fax : +44(0)1543 670 088
- ▶ E-mail : info@rgklife.com

