


HANDBEWOGEN ROLSTOEL

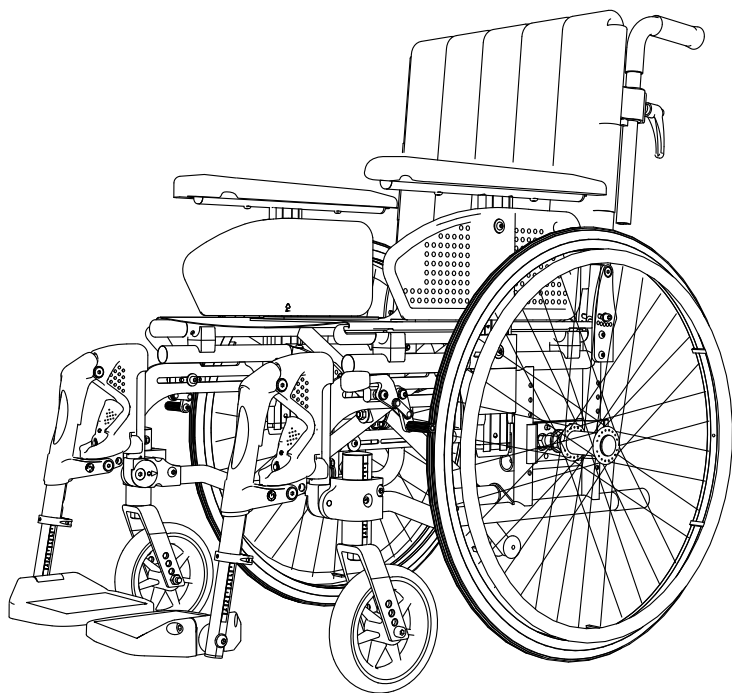

GEbruikersHANDLEIDING **NL**

Exigo 30

 **Breezy®**

MB3197-NL

INLEIDING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rolstoel!

Voor uw persoonlijke veiligheid en om uw nieuwe rolstoel optimaal te kunnen benutten, adviseren we dat u deze gebruikershandleiding eerst goed bestudeert voordat u de stoel in gebruik neemt.

Beoogd gebruik en beoogde gebruikersomgeving

De rolstoel is ontworpen voor zowel binnen- als buitengebruik .

De gebruiker

Deze rolstoel is ontwikkeld voor personen met beperkingen en als hulpmiddel voor mensen die problemen hebben met lopen hebben. Gebruikers die de rolstoel zelfstandig kunnen voortduwen, sturen en remmen, kunnen de rolstoel gebruiken zonder hulp van een begeleider. Het maximale gebruikersgewicht is 135 kg. Gebruikers dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van de gebruikershandleiding voordat ze met de rolstoel gaan rijden.

Aanpassen van de rolstoel

Er bestaat niet zoiets als de gemiddelde rolstoelgebruiker. Daarom zijn de rolstoelen van Sunrise Medical HCM aan te passen aan de specifieke behoeften van de gebruiker. De verstellingen zoals beschreven in hoofdstuk Gebruik van de rolstoel kunnen door de gebruiker worden uitgevoerd. Alle andere in deze gebruikershandleiding genoemde aanpassingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of in overleg met gekwalificeerd personeel.

Voor informatie over productveiligheidsberichten en terughaalacties, gaat u naar www.SunriseMedical.eu

Neem contact op met uw plaatselijke, erkende SUNRISE MEDICAL dealer als u vragen hebt over het gebruik, het onderhoud of de veiligheid van uw rolstoel. In het geval dat er geen erkende dealer in uw buurt of u nog vragen heeft, neem dan schriftelijk of telefonisch contact op met Sunrise Medical.

Het managementsysteem van SUNRISE MEDICAL is gecertificeerd en voldoet aan de ISO 13485 en ISO 14001.



SUNRISE MEDICAL verklaart als fabrikant dat dit product voldoet aan de EU-verordening Medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, MDR) (2017/745).

INLEIDING

OPMERKING:

Algemeen advies.

Wanneer deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot fysiek letsel, schade aan het product of schade aan de omgeving!

Een mededeling aan de gebruiker en/of patiënt: Als dit product betrokken was bij een ernstig incident, dient dit aan Sunrise Medical en de bevoegde autoriteit van de Lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd, te worden gemeld.

Built-4-Me speciale aanpassingen

Sunrise Medical adviseert nadrukkelijk alle bij uw Built-4-Me product meegeleverde gebruikersinformatie zorgvuldig door te lezen voordat u het product voor het eerst gebruikt. Alleen wanneer u de gebruiksaanwijzingen volledig hebt doorgelezen en begrijpt, bent u ervan verzekerd dat het Built-4-Me product functioneert en presteert zoals de fabrikant dit heeft bedoeld.

Sunrise Medical adviseert tevens de gebruikersinformatie na het lezen niet weg te gooien, maar het veilig op te bergen, zodat u de informatie later nog eens kunt doornemen.

Combinaties van medische hulpmiddelen

Het is eventueel mogelijk om dit medische hulpmiddel met één of meerdere andere medische hulpmiddelen of een ander product te combineren. Kijk voor informatie over mogelijke combinaties op www.Sunrisemedical.nl. Alle op de lijst vermelde combinaties zijn gevalideerd om te voldoen aan de Algemene veiligheids- en prestatievereisten, Bijlage I nr. 14.1 van de MDR - Verordening voor Medische hulpmiddelen (2017/745).

Richtlijnen voor de combinatie, zoals de bevestiging, vindt u op www.SunriseMedical.nl

OPMERKING:

NB: het besturen van een rolstoel vereist voldoende cognitieve, fysieke en visuele vaardigheden. De gebruiker moet in staat zijn de effecten van handelingen tijdens het gebruik van de rolstoel te beoordelen en deze zo nodig te corrigeren. Deze vermogens en het veilige gebruik van aanvullend bevestigde onderdelen kunnen niet door Sunrise Medical als fabrikant worden beoordeeld. We kunnen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan accepteren.

Lees de gebruiksaanwijzing van de rolstoel en de aanvullend aangebrachte onderdelen door. Instrueer de gebruiker over het veilige gebruik van de rolstoel en de aanvullend bevestigde onderdelen. Informeer gebruikers over specifieke waarschuwingen die gelezen, begrepen en gerespecteerd moeten worden.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	2
Inhoudsopgave	4
De onderdelen van de rolstoel	5
Montage en transport	6
Toepassingen	7
Gebruik van de rolstoel	8
Instellen van de stoel	14
Veiligheidsgordel	25
Veiligheid	26
Veiligheid in auto's	27
Onderhoud	30
Technische specificaties	33
Merktekens en labels	35
Garantie	37


DE ONDERDELEN VAN DE ROLSTOEL

Voor een goed begrip van deze handleiding is het van belang dat u zich vertrouwd maakt met onze benamingen van de verschillende onderdelen van de rolstoel.

Bestudeer de volgende tekening en noteer de desbetreffende onderdelen van uw rolstoel.

De uitvoering van uw rolstoel kan enigszins afwijken van onderstaande illustratie.

- A. Rugleuning met bekleding
- B. Armlegger
- C. Bescherming voor kleding
- D. Zitting
- E. Beensteun
- F. Frame
- G. Voetplaat
- H. Duwhandvat
- I. Aandrijfwiel
- J. Hoepel
- K. Rem
- L. Wielvergrendeling
- M. Lagerhuis zwenkwiel
- N. Zwenkwielvork
- O. Zwenkwiel

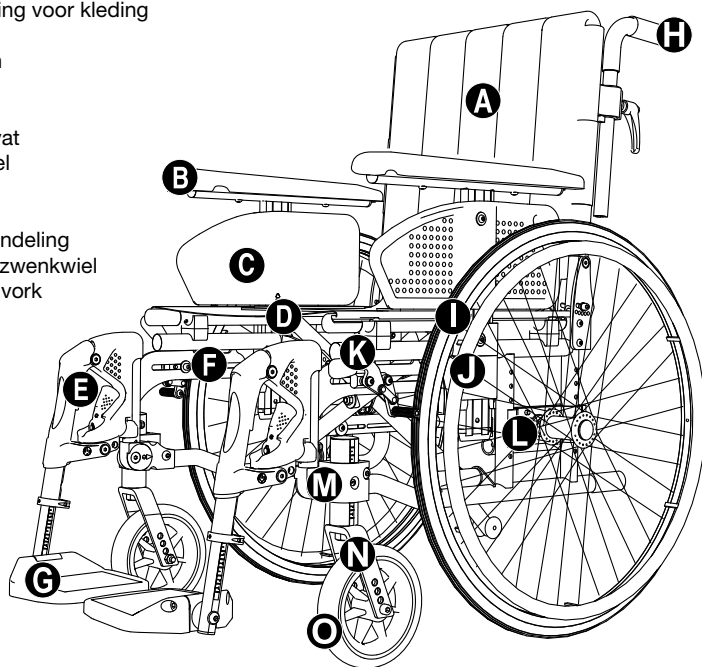

Figuur 1

MONTAGE EN TRANSPORT

Montage *Figuur 2*

De standaarduitvoering wordt compleet gemonteerd geleverd. U hoeft hem alleen maar uit te klappen en eventueel de beensteunen te plaatsen.

Uitklappen van de rolstoel *Figuur 3*

U klapt de rolstoel uit door met de palm van uw hand op de bekleding over de zittingbuis te drukken.

Opgelet:


De zittingbuis zelf niet aanraken aangezien uw vingers dan beklemd kunnen raken.

Druk het zitkussen (accessoire) in positie en zorg er voor dat het kussen goed op de stoelbekleding zit.


Inklappen van de rolstoel *Figuur 4*

Verwijder het zitkussen (accessoire) en trek de voetplaten omhoog of verwijder de beensteunen voordat u de rolstoel inklapt.


Pak de stoelbekleding beet en trek ze recht omhoog. De stoel wordt nu vanzelf ingeklapt. Controleer of de rugbekleding naar achteren bolt.

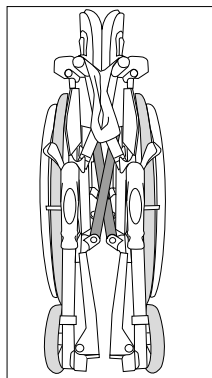

Figuur 2

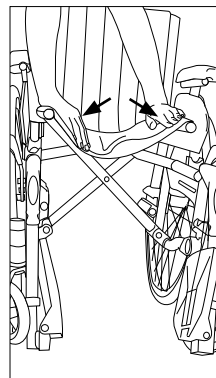

Figuur 3

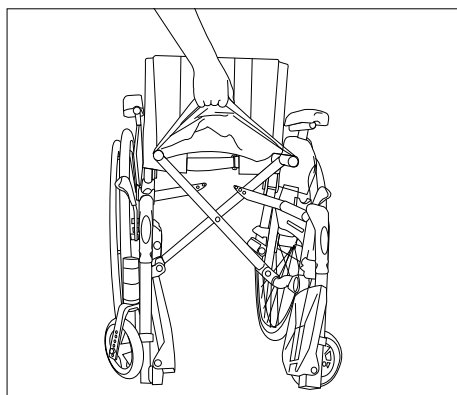

Figuur 4

Transport

De rolstoel is geschikt voor vervoer over land en via de lucht.

Verwijder voor transport delen van de rolstoel die gemakkelijk kunnen worden losgemaakt.

- Armleggers
- Beensteunen
- Achterwielen
- Hoofdsteen

De rolstoel moet voor vervoer in een voertuig worden bevestigd met een ISO 10542 goedgekeurd verankeringsysteem, afgestemd op het gewicht van de betreffende rolstoel inclusief alle opties.

Zie “ Veiligheid in auto's “ op pagina 25 voor het gebruik van de rolstoel als passagiersstoel in een motorvoertuig.

TOEPASSINGEN

Indicaties

De keuze aan beschikbare accessoires en het modulaire ontwerp betekenen dat de rolstoel kan worden gebruikt door personen die niet kunnen lopen of beperkt mobiel zijn vanwege:

- Verlamming
- Amputatie (van been of benen)
- Disfunctioneren of misvorming van been of benen
- Contractuur van/letsel aan gewrichten
- Ziektes zoals hart- en vaatziekten, evenwichtsstoornissen of cachexie, neurologische aandoeningen, spierdystrofie, hemiplegie, evenals voor oudere mensen die nog kracht in het bovenlichaam hebben.

Contra-indicaties

De rolstoel mag niet zonder begeleider worden gebruikt bij:

- Waarnemingsstoornissen
- Evenwichtsstoornissen
- Verlies van beide armen, indien niet door een zorgverlener begeleid
- Gewrichtscontractuur of beschadiging van gewrichten in beide armen
- Onvermogen om te zitten


GEBRUIK VAN DE ROLSTOEL

Snelvergrendeling *Figuur 5*

De wielen van de rolstoel zijn voorzien van een snelvergrendelingspal. Druk op de knop in het midden van het wiel om het wiel te verwijderen of te plaatsen.

Opgelet:

Controleer of het wiel goed is bevestigd. De knop moet circa 5 mm naar buiten steken als de wielbout is helemaal in het huis zit.

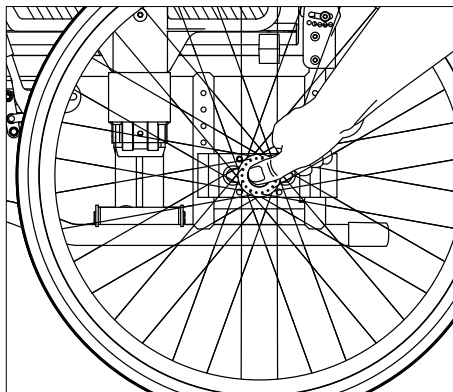


Figuur 5

In de hoogte verstelbare duwhandvatten *Figuur 6*

Het duwhandvat kan worden ingesteld door de vergrendelingshendel los te draaien en het duwhandvat omhoog nu geheel verwijderen door de vergrendelingshendel weer vast.

U kunt het duwhandvat nu geheel verwijderen door de vergrendelingshendel los te draaien, de verende stift (6A) samen te trekken en het duwhandvat omhoog te trekken.

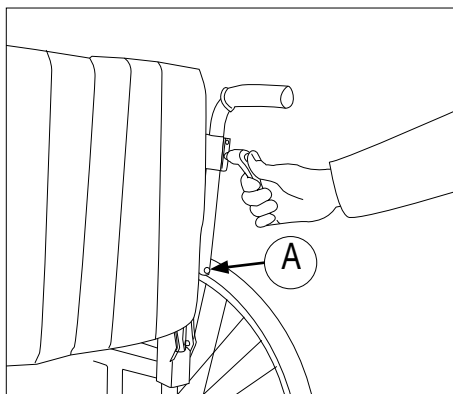


Figuur 6

Armleggers, verwijderen en plaatsen *Figuur 7*

U kunt de armleggers verwijderen door ze recht omhoog te tillen.

⚠ Waarschuwing!

Voorkom dat uw vingers of kleding verstrikt raken in het wiel bij het verwijderen van de armsteun.

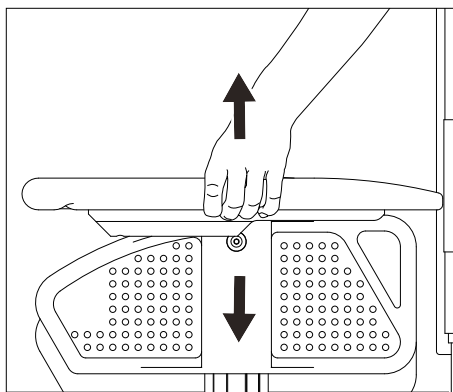

Figuur 7

GEBRUIK VAN DE ROLSTOEL


Uit- en indraaien/bevestigen/ verwijderen van beensteunen

Figuur 8 en 9


Om transfers te vergemakkelijken zijn de beensteunen afneembaar of naar binnen of naar buiten wegzwenkbaar.

Ontgrendel de beensteun door de hendel (8A) naar binnen of naar buiten te draaien.

Indien gewenst kan de beensteun uit het ophangpunt getild worden en volledig worden verwijderd. Om de beensteun weer te plaatsen, volg de bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde. Het hendel wordt automatisch vergrendeld.

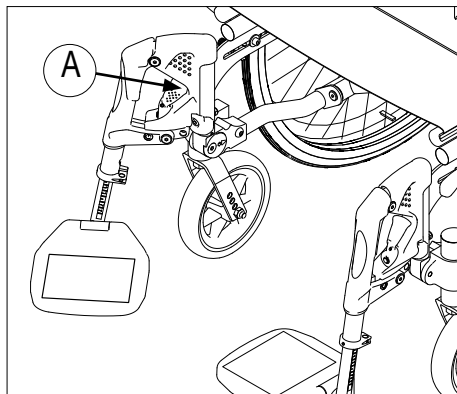

Figuur 8

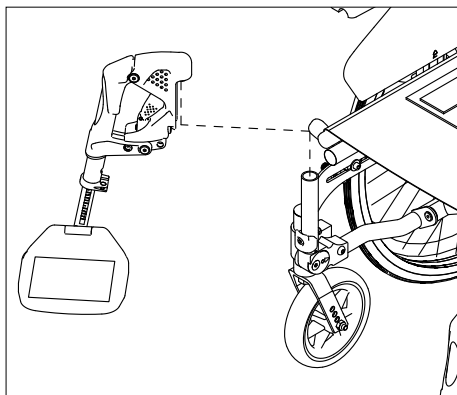


Figuur 9

GEBRUIK VAN DE ROLSTOEL

Voetsteun uit één stuk (standaard op de Exigo 30X-stoelen) *Figuur 10*

De voetsteun uit één stuk kan in tweeën worden gedeeld en bij transport naar boven worden gekanteld. Zorg ervoor dat u de delen van de voetsteun vergrendelt als u ze naar beneden kantelt.

De delen van de voetsteun kunnen het gemakkelijkst worden vergrendeld als ze bij het naar beneden kantelen recht tegenover elkaar staan (zie afb. 10).

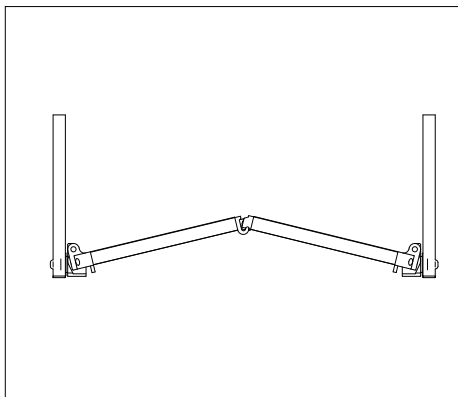


Figuur 10


Uit- en indraaien/bevestigen/verwijderen van beensteunen (Voetsteun uit één stuk) *Figuur 11 en 12*

De beensteunen kunnen eenvoudig naar buiten en naar binnen worden bewogen of in hun geheel worden afgenomen. De steunen kunnen worden verwijderd door de hendel (11A) naar binnen of naar buiten te draaien tijdens het naar binnen of naar buiten draaien van de beensteun.

Nadat de beensteun opzij is gedraaid, kan men hem recht omhoog trekken en desgewenst geheel verwijderen. U kunt de beensteun weer bevestigen door bovenstaande aanwijzingen in omgekeerde volgorde uit te voeren. De hendel wordt automatisch vergrendeld.

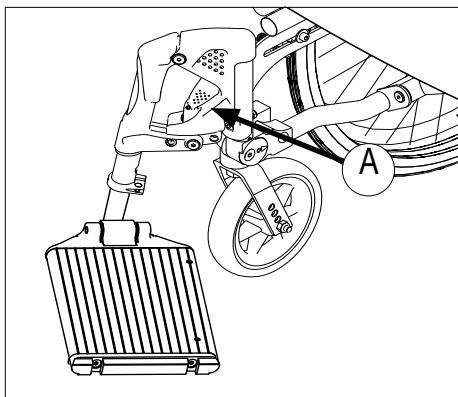

Figuur 11

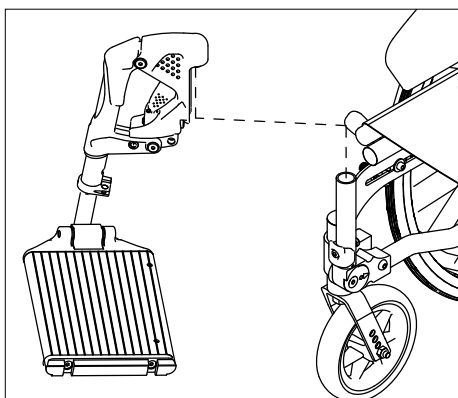


Figuur 12

GEBRUIK VAN DE ROLSTOEL

Gebruik van de remmen *Figuur 13*

Druk de remhendel vooruit en omlaag om de rolstoel op de rem te zetten.


De rem is uitsluitend bedoeld om de stilstaande stoel op zijn plaats te houden. De rem mag met andere woorden absoluut niet worden gebruikt om af te remmen.

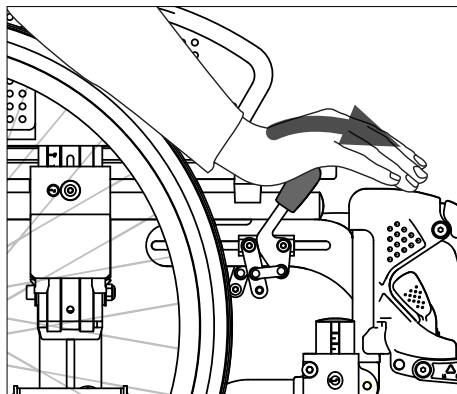

Figuur 13

Anti-kantelstabilisator/kantelstang *Figuur 14*

U zet de anti-kantelstabilisator in positie door hem naar u toe te trekken en hem tegelijkertijd in neerwaartse richting te draaien. De anti-kantelstabilisator is standaard ingesteld met een vrije ruimte tot de ondergrond om over drempels, enz., te kunnen rijden.

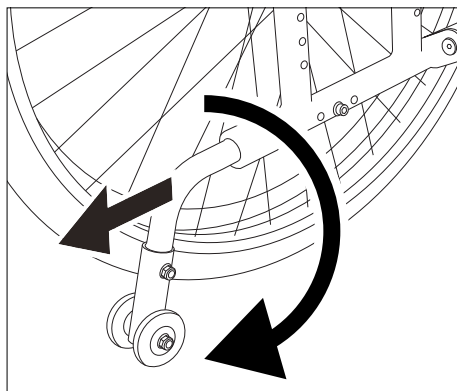


Figuur 14

Anti-kantelstabilisator/kantelstang *Figuur 15*

U zet de anti-kantelstabilisator in positie door hem naar u toe te trekken en hem tegelijkertijd in neerwaartse richting te draaien. De anti-kantelstabilisator is standaard ingesteld met een vrije ruimte tot de ondergrond om over drempels, enz., te kunnen rijden.

De kantelstang kan worden gebruikt als de anti-kantelstabilisator in de bovenste of onderste stand staat.

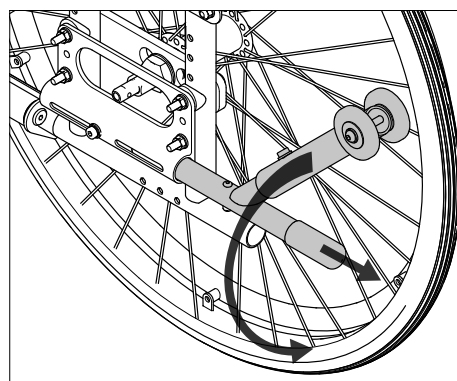


Figuur 15

GEBRUIK VAN DE ROLSTOEL


Transfer in en uit de rolstoel

Figuur 16, 17 en 18


- Zet de rolstoel op de rem
- Zwenk de beensteunen opzij, indien van toepassing
- Ga op het puntje van de rolstoel zitten voordat u de transfer maakt naar een bed, een andere stoel, etc.

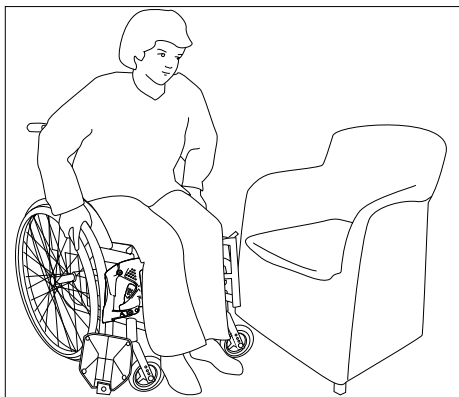

Figuur 16

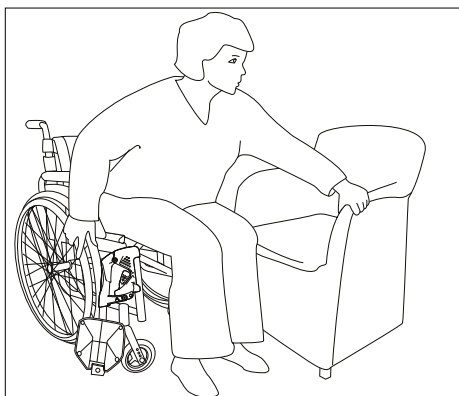

Figuur 17

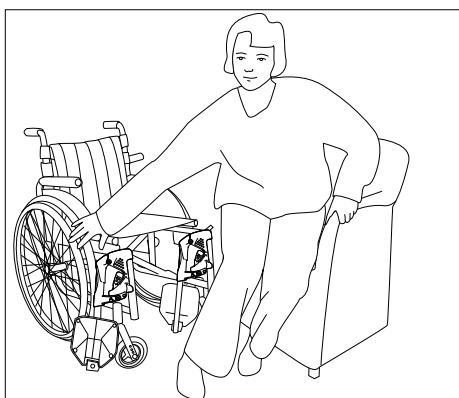

Figuur 18


GEBRUIK VAN DE ROLSTOEL

Obstakels nemen, trappen

Figuur 19 en 20

Als de gebruiker in de rolstoel een trap wordt op- of afgedragen, dienen de aangegeven optilpunten te worden gebruikt. Deze staan aangegeven op de rolstoel.

De duwhandvatten en beensteunen zijn de optilpunten.

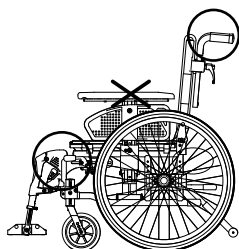

⚠ Waarschuwing!


Til de rolstoel niet op aan de armleggers!

Til de rolstoel niet op aan een in hoek verstelbare beensteunen of aan het ophangpunt van de beensteun.


Opgelet:

Zorg er bij in de hoogte verstelbare duwhandvatten voor dat de hendel is vergrendeld voordat de rolstoel wordt opgetild.

Het is makkelijker om de stoel te dragen als begeleiders aan weerszijden van de stoel tillen.

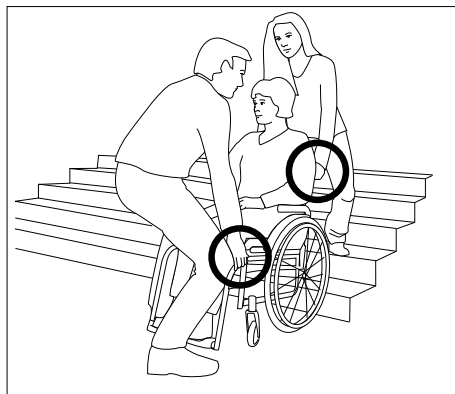

Figuur 19

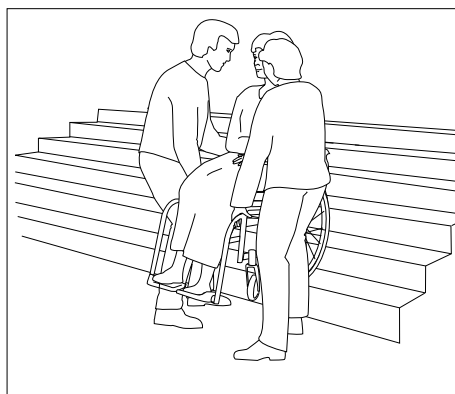

Figuur 20


Obstakels nemen, trottoirbanden

Figuur 21

Om een trottoirband, enz. te nemen, zwenkt u de anti-kantelstabilisator omhoog. Zet daarna één voet op de kantelstang en stuur met de duwhandvatten.

Hellingen

Voor geregeld gebruik in heuvelachtige streken adviseren we om een aparte rem voor de begeleider te monteren.

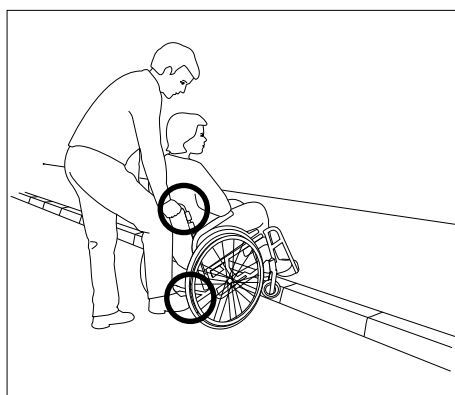

Figuur 21

INSTELLEN VAN DE STOEL

De Exigo 30 is voorzien van meetschalen die een nauwkeurige instelling van de rolstoel vergemakkelijken.

De volgende aanpassingen kunnen sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd met gebruikmaking van de verschillende meetschalen:

- Zithoogte – achter Pagina 13 en 15
De schaal geeft de zithoogte aan in verhouding tot de wielen.
- Zwaartepunt Pagina 16
De meetschaal is genummerd van 1 tot 5, waarbij 1 de beste anti-kantelpositie is.
- Zithoogte – voor Pagina 13, 14 en 17
Traploze schaal van 1 tot 9 die een gelijkmatige instelling van beide zwenkwielen waarborgt.
- Hoek van de zwenkwielen Pagina 17
Traploze schaal die een gelijkmatige instelling van beide zwenkwielen waarborgt.
- Rugleuninghoogte Pagina 18
De schaal geeft de hoogte van de rugleuning aan van 35 cm tot 45 cm.
- Rugleuninghoek Pagina 18
De schaal geeft de hoek van de rugleuning aan van -5° tot 16° .
- Anti-kantelstabilisator Pagina 20
De meetschaal is genummerd van 1 tot 5 om het afstellen van de anti-kantelstabilisator in verhouding tot de wielpositie te vergemakkelijken.
- Beensteunlengte Pagina 20
Traploze schaal van 1 tot 9 die een gelijkmatige instelling van beide beensteunen waarborgt.
- Armleggerhoogte Pagina 22
De schaal geeft de afstand aan vanaf de zitting tot aan de bovenzijde van de armlegger. 18 cm tot 24 cm voor standaard armleggers en 22 cm tot 29 cm voor hoge armleggers.

INSTELLEN VAN DE STOEL

Instellen van de zithoogte

De zithoogte kan eenvoudig worden ingesteld. U kunt ook de hoek van de zitting instellen door verschillende hoogten aan de voor- en achterzijde in te stellen. De aanpassing van de zithoek resulteert in een beter evenwicht en zitcomfort. De verschillende zithoogte-instellingen hebben ook effect op de mogelijkheid om obstakels te nemen en op de roleigenschappen van de rolstoel.

Instellen van de zithoogte – achter

Figuur 22 en 23


De zithoogte kan achteraan worden gewijzigd met gebruikmaking van onderstaande methoden.

Wielvergrendeling omhoog of omlaag zetten


Als u de wielvergrendeling omhoog zet, wordt de zitting verlaagd. Als u de wielvergrendeling omlaag zet, wordt de zitting verhoogd. Zie pagina 15.

Grotere of kleinere wielen monteren

Een groter wiel verhoogt de zitting, terwijl een kleiner wiel de zitting verlaagt. De tabel op pagina 31 geeft aan welke zithoogten mogelijk zijn door het monteren van andere wielafmetingen.

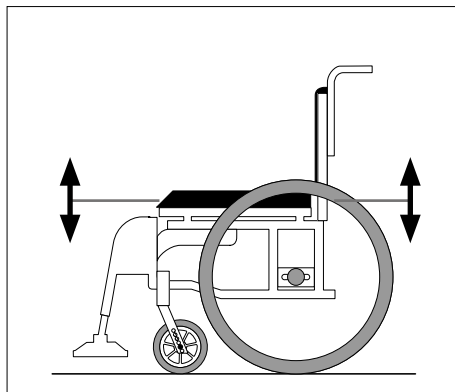

Figuur 22

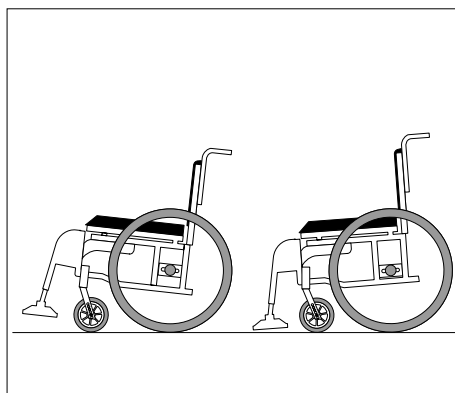

Figuur 23

INSTELLEN VAN DE STOEL

Instellen van de zithoogte – voorzijde

Figuur 24

Zwenkwiel hoger of lager in de zwenkwielvork zetten

Als u de positie van het zwenkwiel in de zwenkwielvork (24A) verhoogt, wordt de zitting verlaagd en als u het zwenkwiel in een lagere stand zet, wordt de zitting verhoogd.

Grotere of kleinere zwenkwielen monteren

Een kleiner zwenkwiel verlaagt de zitting, een groter zwenkwiel verhoogt de zitting. Het monteren van een kleiner zwenkwiel resulteert in een kleinere draaicirkel, wat de mogelijkheid om obstakels in nauwe ruimten te nemen ten goede komt en ook meer beenruimte oplevert. Een groter zwenkwiel zal de draaicirkel vergroten, maar het vergemakkelijkt het nemen van obstakels op een oneffen ondergrond.


Langere of kortere zwenkwielvork monteren

Een kortere zwenkwielvork verlaagt de zitting, geeft een kleinere draaicirkel, vergemakkelijkt zo het nemen van obstakels in nauwe ruimten en het levert tevens meer ruimte voor de benen op. Een langere zwenkwielvork verhoogt de zitting en maakt het gebruik van verschillende zwenkwielalternatieven mogelijk.

De tabel op pagina 31 geeft aan welke zithoogten mogelijk zijn door bovenstaande methoden toe te passen.

Opgelet:

Vergeet niet om de hoek van het zwenkwiel aan te passen als u de zithoogte wijzigt en de remmen bij te stellen als u de zithoogte achteraan wijzigt.

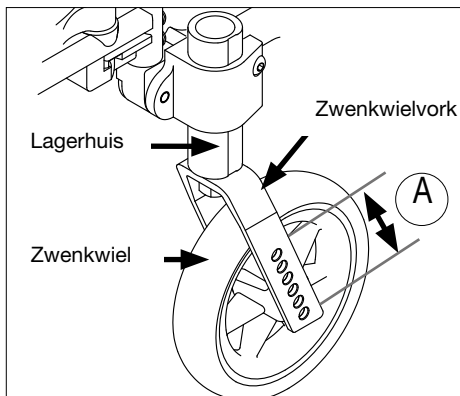

Figuur 24

INSTELLEN VAN DE STOEL


Instellen van de zithoogte – achter

Figuur 25 en 26


Op het frame van de rolstoel treft u een meetschaal aan (26A) die de zithoogte aangeeft in verhouding tot de wielafmeting.

- Verwijder het wiel
- Draai de schroef (26B) zo ver mogelijk los met een 27 mm-sleutel
- Trek de binnenste en buitenste wielvergrendeling een beetje uiteen
- Verstel de wielvergrendeling stapsgewijze omhoog of omlaag overeenkomstig de schaal
- Druk de binnenste en buitenste wielvergrendeling weer samen

Opgelet: Het is belangrijk dat de pennen in de wielvergrendeling in de openingen in het frame vallen en dat het huis horizontaal in de gleuf ligt voordat u de schroef vastdraait.

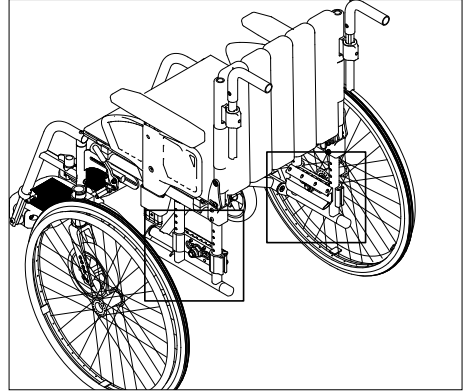

Figuur 25

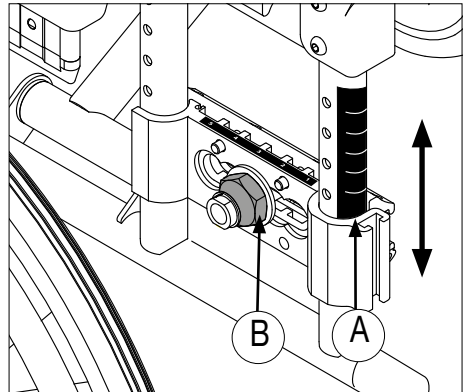

Figuur 26

24	22	20
40	38	36
42	40	38
44	42	40
46	44	42
48	46	44

**Alternatieve
wielafmetingen**

**Zithoogten die
mogelijk zijn met
de verschillende
stappen op de
schaal**

Zoek bovenaan op de schaal uw wielafmeting op. De kolom onder de wielafmeting geeft aan waar de wielvergrendeling moet zitten om de desbetreffende zithoogte te verkrijgen.

INSTELLEN VAN DE STOEL

Instellen van het zwaartepunt

Figuur 27 en 28

Het wiel kan worden ingesteld in vijf uiteenlopende posities in verhouding tot het zwaartepunt.

Deze worden weergegeven op de schaal (27A) op de wielvergrendeling. Positie 1 is de beste anti-kantelpositie.

- Draai de schroef (27B) zo ver mogelijk los met een 28 mm-sleutel.
- Verplaats het huis van het wiel vooruit of achteruit (Figuur 28).

Let op!


Het is belangrijk dat de pennen in de wielvergrendeling in de openingen in het frame vallen en dat het huis horizontaal in de gleuf ligt voordat u de schroef vastdraait.

⚠ Waarschuwing!


Vergeet niet om de remmen en de anti-kantelstabilisator bij te stellen als u de zithoogte en het zwaartepunt hebt gewijzigd.

Let op!

Als u de hoogte en het zwaartepunt wijzigt, moeten de wielen eerst worden afgesteld en daarna de hoogte en de hoek van de zwenkwielen.

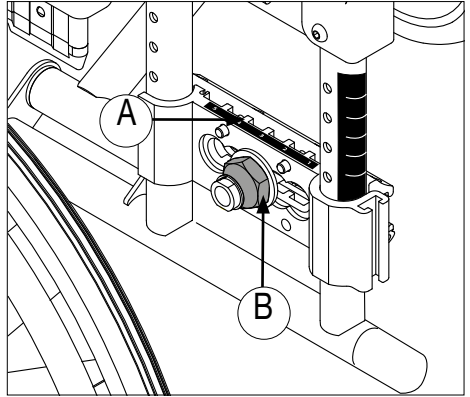

Figuur 27

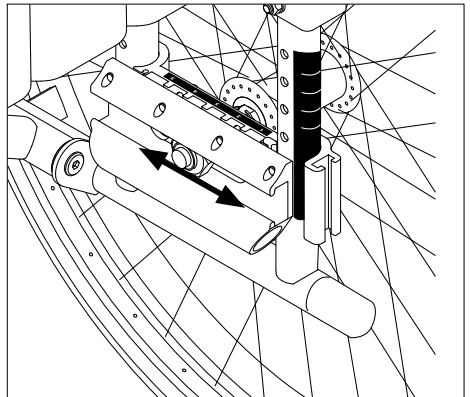


Figuur 28

INSTELLEN VAN DE STOEL

Instellen van de zithoogte – vooraan

Figuur 29, 30 en 31

Als u de hoogte van de rolstoel wijzigt, moet eerst de hoogte van de wielen worden afgesteld en daarna pas de hoek. Er is een schaal beschikbaar voor het instellen van zowel de hoogte als de hoek van de zwenkwielen, wat een gelijkmatige instelling van de beide zwenkwielen vergemakkelijkt.

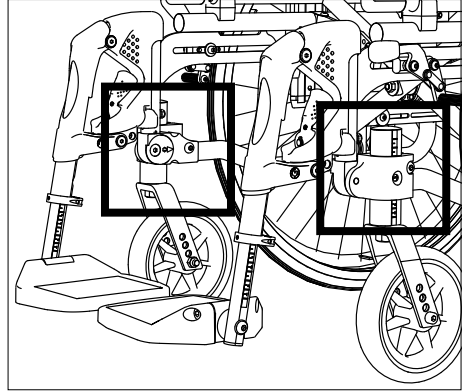


Figuur 29

Instellen van de zwenkwielhoogte

Figuur 30

Het aandrijfwielt heeft een schaal van 1–9 die het instellen van dezelfde hoogte voor beide zwenkwielen vergemakkelijkt.

- Draai de schroef los (30A)
- Stel de gewenste hoogte in, zie de schaal (30B)
- Draai de schroef weer vast

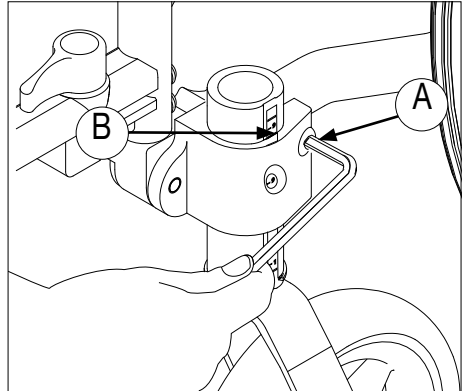


Figuur 30

Instellen van de zwenkwielhoek

Figuur 31

- Draai de schroef (31A) enigszins los
- Draai de schroef los (31B)
- Plaats de Inbussleutel in de draaischijf (31C) en draai naar de gewenste hoek. Zie de schaal
- Draai de schroef (31B) vast (U kunt een schroefdraadborgingsproduct, zoals blauwe Locktite nr. 243, gebruiken)
- Draai de schroef (31A)

Als het voorste zwenkwiel in de correcte hoek staat, bevindt het lagerhuis zich in een rechte hoek (90°) op de basis. Dit kunt u doen door toepassing van een haakse hoek op de basis.

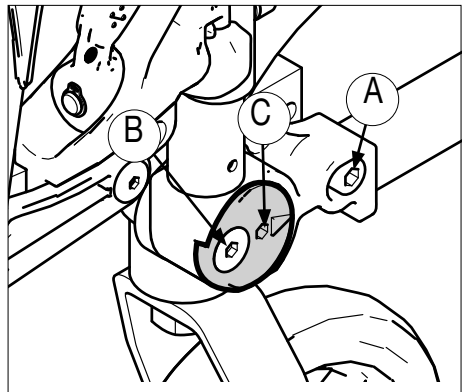


Figuur 31

INSTELLEN VAN DE STOEL

Instellen van de hoogte van de rugleuning *Figuur 32*

Als u de hoogte van de rugleuning wilt afstellen, kunt u de rugleuningbuizen bereiken door het "deksel" (32C) in de bekleding van de rugleuning te openen. De meetschaal (32A) geeft de rugleuninghoogte aan. U komt gemakkelijker bij de rugleuningbuizen als u de duwhandgreep optilt. De afstelling kan worden uitgevoerd terwijl de gebruiker in de rolstoel zit. Ook is het niet noodzakelijk om de rijwielen te verwijderen als u de hoogte van de rugleuning aanpast.

- Draai de schroef in de rugleuningbuis (32B) los
- Stel de gewenste rugleuninghoogte in. Zie de meetschaal
- Draai de schroef weer vast

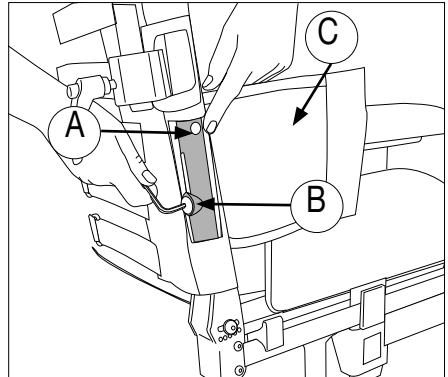


Figuur 32


Instellen van de hoek van de rugleuning *Figuur 33 en 34*

De hoek van de rugleuning kan worden ingesteld van -5° tot 15° , met intervallen van 5° . De schaal op de bevestigingsbeugel van de rugleuning geeft de rugleuninghoek (34A) aan. De afstelling kan worden uitgevoerd terwijl de gebruiker in de rolstoel zit. Ook is het niet noodzakelijk om de rijwielen te verwijderen als u de hoek van de rugleuning aanpast.

- Draai schroef (34B) circa 5 mm los
- Trek de borgring (34C) naar buiten, stel de hoek van de rugleuning in en laat de borgring los in de gewenste hoek
- Draai de schroef (34B) weer vast

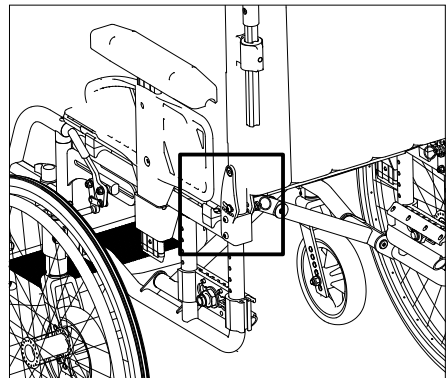

Figuur 33

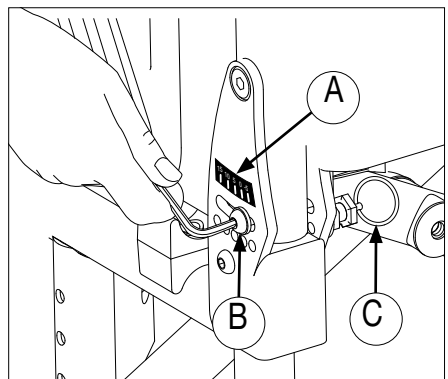


Figuur 34

INSTELLEN VAN DE STOEL

Instellen van de kromming van de rugleuning *Figuur 35*

De rolstoel heeft een gepolsterde rugleuning die kan worden aangepast aan de kromming van de rugleuning om een comfortabele zitpositie en een goed evenwicht te bewerkstelligen. De gebruiker kan tijdens het instellen van de kromming van de rugleuning in de rolstoel blijven zitten.

Maak de bekleding van de rugleuning los om bij de klittenbanden te komen. Deze kunnen worden bijgesteld om de kromming van de rugleuning aan te passen en zo een maximaal comfort en optimale steun te bewerkstelligen.

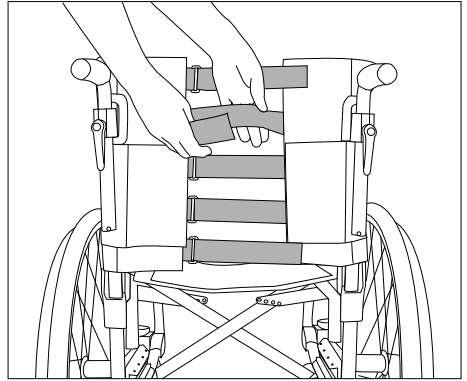


Figuur 35

Instellen van de remmen *Figuur 36 en 37*


De standaard rolstoel wordt geleverd met remmen die zijn gemonteerd in de middelste aandrijfwielpositie.

U kunt de rem verwijderen door de schroef (36A) op de binnenkant van het frame aan de voorkant van de rolstoel los te draaien. Verplaats de complete rem door de gleuf in de gewenste positie. De juiste afstand tussen het remblok en het wiel (37A) is circa 2,5 cm.

De remmen die bij de rolstoel zijn inbegrepen hoeven normaal gesproken niet te worden bijgesteld.

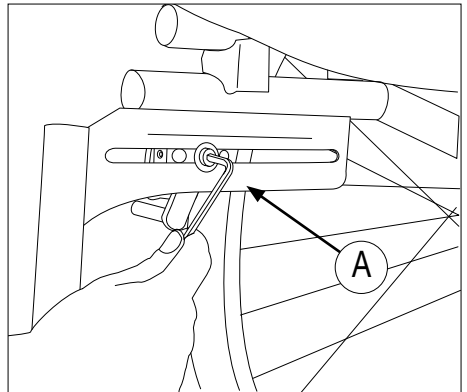

Figuur 36

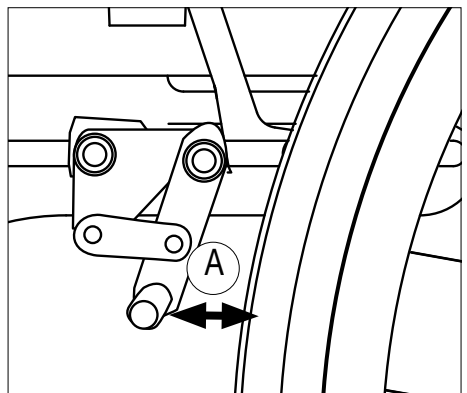


Figuur 37

INSTELLEN VAN DE STOEL

Instellen van de anti-kantelstabilisator *Figuur 38*


Stel de anti-kantelstabilisator bij nadat u het zwaartepunt van de rolstoel hebt veranderd. Draai de schroef los (38A). Trek of duw de anti-kantelstabilisator in positie zodat de waarde op de meetschaal van de stabilisatorstang met de wielpositie correspondeert. Draai de schroef weer vast. Er moet een speling zijn van maximaal 35 mm van het uiteinde van de anti-kantelstabilisator tot de basis. Dit kan worden bijgesteld door de schroef (38B) los te draaien en aan/op de onderste buis van de anti-kantelstabilisator te trekken of te duwen. Draai de schroef weer vast.

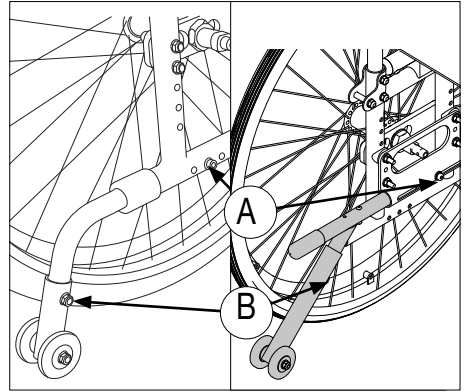

Figuur 38

Instelling van de lengte van de beensteunen *Figuur 39*

De beensteunen hebben aan de buitenkant een lineaire schaal (39A) die het instellen van de juiste lengte vergemakkelijkt. Om de lengte van de beensteunen in te stellen draait u de bevestigingsschroef (39B) circa 5 mm los. Stel de beensteunen nu in op de gewenste lengte en draai de schroef weer vast.

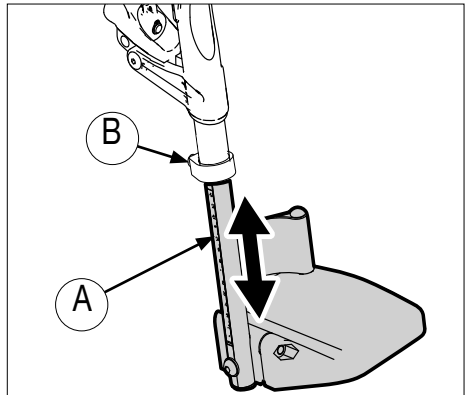


Figuur 39

Instelling van de hoek van de beensteun *Figuur 40*

De hoek van de beensteun kan worden ingesteld op 70°, 80° of 90°.

- Draai de schroef eruit (40A)
- Trek of duw de beensteun in de gewenste hoek
- Doe de schroef in het juiste gat en draai deze vast

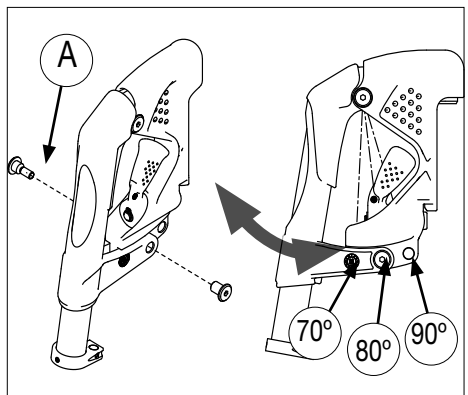

Figuur 40

INSTELLEN VAN DE STOEL


Instellen van de zitdiepte

Figuur 41, 42 en 43


U kunt de zitdiepte instellen door de stoelbekleding naar voor of achter te trekken, totdat de gewenste zitdiepte is ingesteld.

- Maak de overlappende klittenband(41A) in de stoelbekleding los
- Klap de rolstoel in. Hierdoor komt de stoelbekleding voldoende los en kunt u deze verschuiven
- Trek de stoelbekleding naar voor of achter om de gewenste zitdiepte in te stellen
- Maak de overlappende klittenband in de stoelbekleding vast en klap de rolstoel uit


De tabel op pagina 31 geeft aan welke zitdiepten mogelijk zijn voor uw rolstoel.

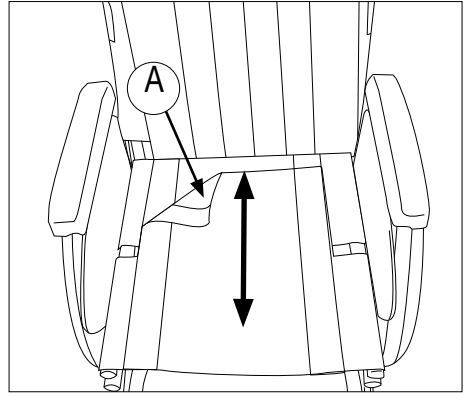

Figuur 41

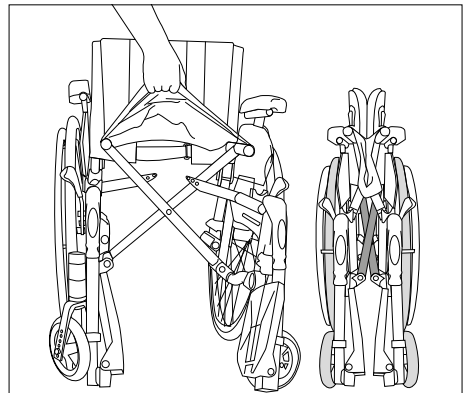

Figuur 42

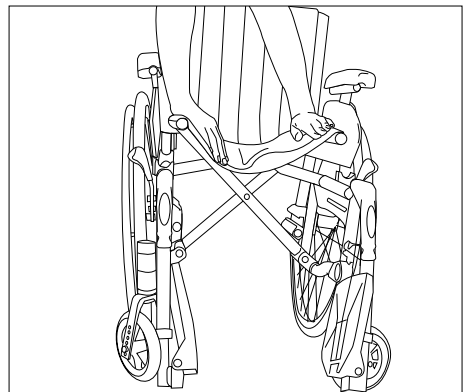


Figuur 43

INSTELLEN VAN DE STOEL

Instellen van de hoogte van de armlegger *Figuur 44*

U kunt de hoogte van de armlegger instellen door de schroef (44A) los te draaien. Verhoog of verlaag de armlegger in de gewenste positie. Gebruik de schaal (44B) om de beide armleggers op dezelfde hoogte in te stellen. De schaal geeft het aantal centimeter aan van de zitting tot de bovenzijde van de armlegger. Draai de schroef weer vast. Na het instellen van de armlegger kan de bescherming voor de kleding worden verplaatst ter voorkoming van openingen naar het wiel. Draai de schroef (44C) los en duw de bescherming voor de kleding omhoog of omlaag. Draai de schroef weer vast. (Het is niet mogelijk om de zijschildjes van de Legend-2 (Zitbreedte 54-60) af te stellen.)

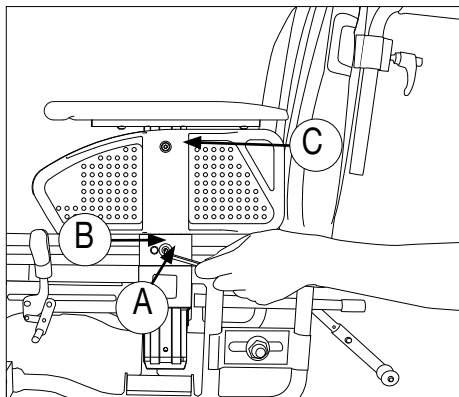


Figuur 44

Naar voren of achteren verstellen van de armleuning *Figuur 45*

Wijzig de positie van de armleuningen door het kussen van de armleuning naar voren of naar achteren te verplaatsen.

- Draai de schroeven los (45A) met een 10 mm steeksleutel
- Trek of duw het kussen naar voren of naar achteren in de gewenste positie, en draai de schroeven weer vast

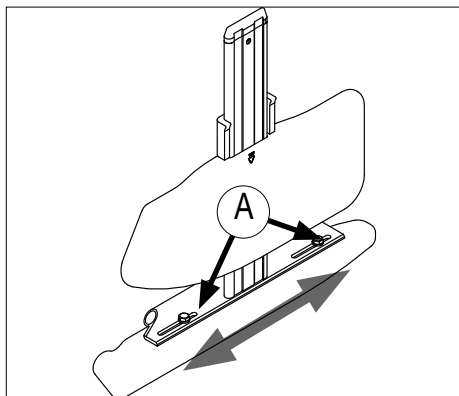

Figuur 45


VEILIGHEIDSGORDEL

Montage van de heupgordel (accessoire) *Figuur 46, 47 en 48*


- Draai de schroef los (46A). Gebruik een 4 mm inbussleutel.
- Monteer de heupgordel zoals aangegeven in figuur 47. Gebruik de schroef die u zojuist hebt verwijderd.
- Zorg ervoor dat de heupgordel is aangepast aan de rolstoelgebruiker. De gordel moet strak over de heup liggen met een hoek van ca. 46° vanaf het punt waar de gordel aan de stoel is bevestigd.
- Zorg ervoor dat de gordel te allen tijde schoon is en dat het vergrendelingsmechanisme goed werkt. De gordel en het vergrendelingsmechanisme kunnen met een vochtige doek worden schoongemaakt.

⚠ Waarschuwing!


Wanneer de gordel boven de heup wordt geplaatst, over het weke gedeelte van de buik, kan dat leiden tot een verkeerde zithouding, waardoor de gebruiker onderuit zakt.

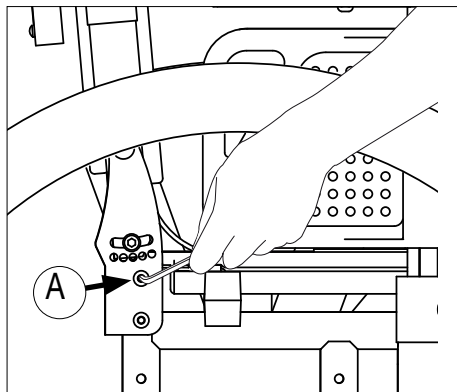

Figuur 46

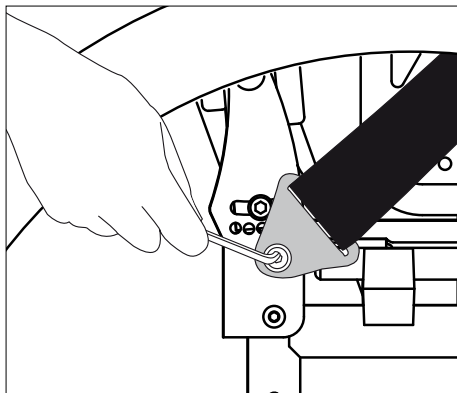


Figuur 47

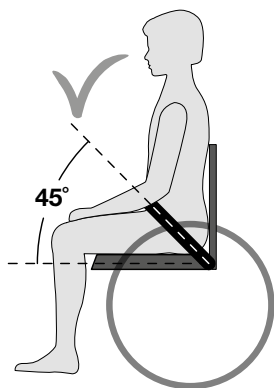

Figuur 48


Juiste positie van de gordel

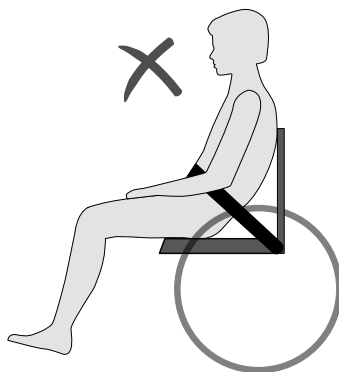

Verkeerde positie van de gordel

VEILIGHEID

- Ga niet op de voetplaten staan en oefen er geen grote druk op uit.
- Een rolstoel moet worden beschouwd als een vervanging van het lopen. Gebruikers moeten zich daarom als voetganger gedragen en zich niet op verkeerswegen of straten begeven.
- Zorg er tijdens de transfer uit de rolstoel voor dat u op een vaste en zo effen mogelijke ondergrond staat. Controleer of de rolstoel op de rem staat om ervoor te zorgen dat de rolstoel niet onverhoeds in beweging komt.
- De maximale gewichtcapaciteit van de Exigo 30 is 135 kg.
- U dient de rolstoel regelmatig te inspecteren om ervoor te zorgen dat alle schroeven, bouten en andere bevestigingen goed vastzitten.
- Zorg ervoor dat de anti-kantelstabilisator altijd is ingeschakeld zolang de rolstoel in gebruik is.
- Aanpassingen in de positie van de zitting of wielen kunnen buiten de veiligheidsgrenzen vallen; Als u wijzigingen aanbrengt, zoals het verplaatsen van aandrijfwielen of zwenkwielen, het wijzigen van de rugleuningshoogte, enz., kan dit effect hebben op bepaalde eigenschappen van de rolstoel, zoals het evenwicht en het kantelpunt. Wees extra voorzichtig als de rolstoel opnieuw in gebruik genomen wordt.
- Het verdient aanbeveling dat er een bevoegde begeleider aanwezig is tijdens de transfer in en uit de rolstoel.
- Zorg ervoor dat kleding, bagage en andere voorwerpen niet tussen de spaken komen.
- Houd rekening met het risico dat uw vingers beklemd kunnen raken. Steek uw vingers niet tussen de kledingbescherming en het wiel of tussen het wiel en de rem.
- Als de voorkant van de rolstoel verhoogd moet worden om een obstakel te overwinnen, doe dit dan absoluut niet door de duwhandvatten omlaag te drukken. Zet een voet op de kantelstang en oefen een matige druk uit op de duwhandvatten. Neem voor gebruik van een anti-decubitus kussen contact op met de leverancier om te checken of het kussen rechtstreeks op een zitmat geplaatst mag worden.
- Als de gebruiker lang in de rolstoel zit, brengt dit een verhoogd risico van drukwonden met zich mee. Als het risico van drukwonden groot is, kan men een speciaal zitkussen gebruiken om dit te voorkomen.

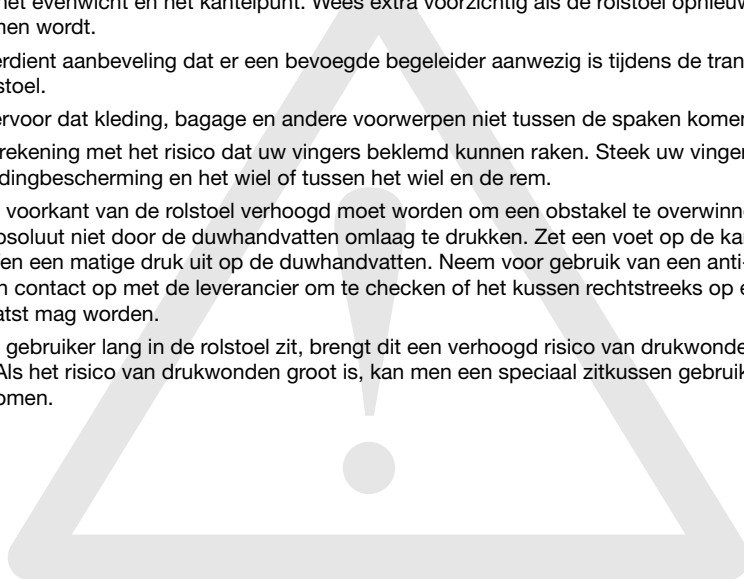

VEILIGHEID IN AUTO'S

Legend-2 als passagiers stoel in een auto.


De rolstoelgebruiker dient indien mogelijk een transfer te maken naar een zitplaats in de auto en de door de fabrikant van het voertuig geïnstalleerde veiligheidsgordel te gebruiken. De ongebruikte rolstoel dient tijdens het vervoer in een laadruimte geplaatst te worden of vastgezet te worden in het voertuig.

De rolstoel kan gebruikt worden als een passagiersstoel in de auto, fixatie d.m.v 4-punts bevestigingssysteem. De rolstoel is getest volgens ISO 7176/19.

Als de rolstoel als passagiersstoel wordt gebruikt, dient deze in de rijrichting te staan. De rolstoel moet bevestigd zijn met het vergrendelingssysteem waarvoor het is getest; Het systeem is een 4-punts bevestigingssysteem. Het systeem vergrendeld zowel stoel als gebruiker met de auto. Het systeem vergt bevestigingsrails in de auto.

De Legend-2 heeft 4 markeringspunten (Afbeelding 49) die gebruikt moeten worden voor de vergrendeling van de stoel:

- De buis van het zijframe aan de achterzijde, boven het wielblok
- Voorste buis van het zijframe, boven de beensteunophanging

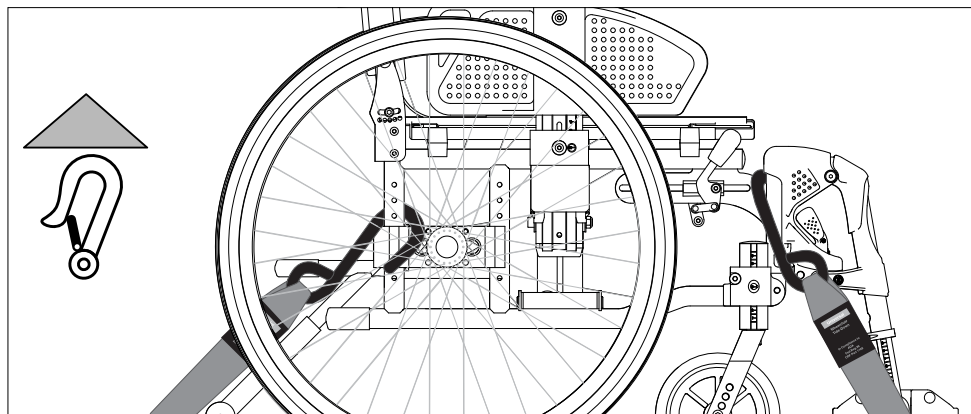

Figuur 49

⚠ Waarschuwing!

Sunrise kan niet aansprakelijk worden gesteld als de Legend-2 als passagiersstoel in een auto wordt gebruikt met een vergrendeling anders dan hierboven beschreven.

VEILIGHEID IN AUTO'S

Vastzetten van de gordel:

- De gordel moet zo strak mogelijk over de heupen worden vastgezet, tussen 30° and 75°
- Het andere deel van de gordel loopt over borst en schouder
- De gordel moet zo strak mogelijk worden aangespannen en mag niet gedraaid zijn
- Let er op dat de gordel niet van het lichaam wordt gehouden door rolstoeldelen, zoals bijv. de armsteunen of wielen. Zie afbeelding 50 voor een correctie positie.
- De stoel mag niet achterover kantelen als deze als passagiersstoel in een auto wordt gebruikt

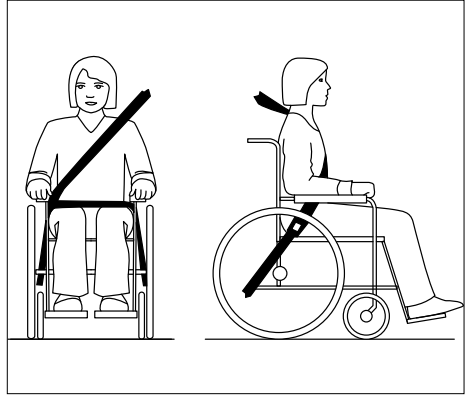


Figure 50



WAARSCHUWING

- a) Daar waar mogelijk moet de stoel in rijrichting staan en vergrendeld worden conform de instructies van de fabrikant van het bevestigingssysteem.
- b) Deze rolstoel is getest voor gebruik in auto's en voldoet aan de eisen die gelden voor transport in rijrichting. De rolstoel is niet getest voor afwijkende posities in een voertuig.
- c) The rolstoel is dynamisch getest voor gebruik in rijrichting, waarbij de gebruiker een 3-punts gordel gebruikt.

VEILIGHEID IN AUTO'S

- d) De 3-punts gordel moet worden gebruikt om de kans op hoofd en borst verwondingen te minimaliseren bij eventuele botsingen met delen van de auto.
- e) Om ongelukken te voorkomen dienen werkbalden die niet voldoen aan de veiligheidseisen:
 - verwijderd te worden en separaat vergrendeld te worden
 - vergrendeld te worden aan de rolstoel, waarbij gebruik wordt gemaakt van schokabsorberend materiaal tussen werkblad en gebruiker
- f) Daar waar mogelijk dienen accessoires vergrendeld te worden aan de rolstoel. Anders dienen de accessoires te worden verwijderd en vergrendeld in het voertuig tijdens transport.
- g) Ondersteunings en positionerings uitrustingen mogen niet gezien worden als veiligheids uitrustingen/gordels als deze niet voorzien zijn van een label dat aangeeft dat ze voldoen aan ISO 7176/19-2008
- h) Na een botsing dient de rolstoel geïnspecteerd te worden door een door de fabrikant geautoriseerd persoon, alvorens deze opnieuw mag worden gebruikt.
- i) Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan de verankeringspunten/auto bevestigingen van de rolstoel. Ook ontwerp wijzigingen aan het frame, zonder afstemming met de fabrikant, zijn niet toegestaan.

ONDERHOUD

De in dit hoofdstuk beschreven onderhoudswerkzaamheden kunnen door de gebruiker zelf worden uitgevoerd. Overige onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht door bevoegd personeel van uw plaatselijke leverancier of helpcenter. Voor informatie aangaande reparaties of service kunt u zich wenden tot het helpcenter in uw land.

Reinigen van het frame

Het frame moet regelmatig worden afgewassen met zacht zeepwater. Als het frame erg vuil is kan men schuurmiddel gebruiken. Het frame kan ook worden afgespoeld met een hogedrukstraal. Spuit dan echter niet direct op de kogellagers met de straal. Droog de rolstoel grondig af na het reinigen of als de rolstoel in de regen is geweest. Als u een schuurmiddel hebt gebruikt, moeten de beweeglijke onderdelen opnieuw worden gesmeerd.

Desinfectie

Desinfectie mag uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel. De rolstoel kan worden gedesinfecteerd met een desinfectiemiddel dat 70-80 % ethanol bevat. Gebruik geen desinfectiemiddelen die fenol of chloor bevatten.

Reinigen van zitting- en rugleuningbekleding

De stoelbekleding, rugbekleding en extra rugbekleding kunnen worden gewassen bij 60°C. Zie de wasinstructie op de verschillende stoffen. Voor desinfecteren, gebruik een goedgekeurde chemische ontsmettingsmiddel. Niet geschikt voor desinfecteren via hittebehandeling.

Omstandigheden die schade aan de rolstoel kunnen veroorzaken

De rolstoel dient niet te worden gebruikt bij temperaturen onder -35°C of boven 60°C. Er zijn geen beperkingen van toepassing wat betreft vochtigheid of atmosferische druk. Op de opslag van de rolstoel zijn geen bijzondere voorwaarden van toepassing, behalve voornoemde beperkingen.

Schroeven en moeren

Schroeven en moeren kunnen mettertijd los gaan zitten. Vergeet daarom niet om dit regelmatig te controleren en de schroeven en moeren zo nodig aan te halen. U kunt een schroefdraadborgingsproduct, zoals blauwe Loctite nr. 243, gebruiken. Nadat een borgmoer verwijderd is geweest, verliest ze haar borgende eigenschappen enigszins en moet daarom worden vervangen.

Aandrijfwielen

De aandrijfwielen zijn voorzien van spaken. Deze moeten minstens één maal per jaar worden bijgesteld. Neem hiertoe contact op met een plaatselijke fietsenmaker of uw plaatselijke helpcenter.

Snelvergrendelingspal op wielen

De snelvergrendelingspal op de aandrijfwielen dient regelmatig te worden geïnspecteerd. Controleer of de lagers naar behoren functioneren. De losbout en lagers moeten regelmatig worden gereinigd en gesmeerd met olie.

ONDERHOUD

Aanbevolen bandenspanning

De rolstoel wordt standaard geleverd met massieve wielen. Zoek de maat op het wiel/zwenkwiel staat en zoek daarna de aanbevolen maximumluchtdruk op in de tabel. Denk eraan dat de rolstoel bij een hoge bandenspanning makkelijker rolt, terwijl een lagere druk een beter dempend effect heeft. Om optimale eigenschappen te waarborgen dient de bandenspanning regelmatig te worden gecontroleerd.

	kPa	Bar	PSI
Aandrijf wiel, lucht	350	3,5	50
Aandrijf wiel, hoge druk	630	6,3	90
Zwenkwiel 6", lucht	250	2,5	35
Zwenkwiel 8", lucht	250	2,5	36

Gereedschap voor service en onderhoud van de rolstoel

Afstellen:	Verktøy:
Remmen	Inbussleutel 4 mm
Beensteunlengte	Inbussleutel 5 mm
Voetplaten	Inbussleutel 5 mm
Anti-kantelstabilisator	Inbussleutel 4 mm, 5 mm, Steeksleutel 10 mm
Armleggerhoogte	Inbussleutel 4 mm
Rugleuninghoogte	Inbussleutel 4 mm
Rugleuninghoek	Inbussleutel 5 mm
Zitdiepte	Inbussleutel 3 mm
Zithoogte voorzijde	Inbussleutel 6 mm
Aandrijf wielpositie	Steeksleutel 27 mm
Zwenkwielhoek	Inbussleutel 5 mm

Reparaties

Behalve kleinere lakreparaties, het verwisselen van banden en het bijstellen van de remmen, dienen alle reparaties te worden uitgevoerd door bevoegd personeel van uw plaatselijke leverancier of door het helpcenter.

Voor informatie aangaande reparaties of service kunt u zich wenden tot het helpcenter in uw land.

ONDERHOUD

Vervangen van luchtbanden

Figuur 51


Luchtbanden zijn als accessoire beschikbaar.

Banden verwijderen

- Verwijder het wiel, laat de band leeglopen door de pin in het ventiel in te drukken of door het ventiel los te draaien.
- Zorg ervoor dat de rand van de band goed in de binnenste gleuf van de velg (51A) ligt.
- Trek de rand van de band over de velgrand heen. Gebruik zo nodig de speciale bandenlichter (51B). Verzeker u ervan de binnenband niet beklemd raakt tussen de bandafnemer en de velgrand.

Banden plaatsen

- Plaats de binnenband in de nieuwe buitenband en breng een middel aan op het uiteinde van de band (51C) dat de wrijving vermindert (zeep of een speciaal bandmontagemiddel).
- Zorg ervoor dat het uiteinde van de band aan een zijde goed in de gleuf van de velg (51A) ligt. Trek de band over de rand. Zorg ervoor dat de binnenband niet beklemd raakt.
- Pomp de band op de juiste spanning en monteer het wiel op de rolstoel.

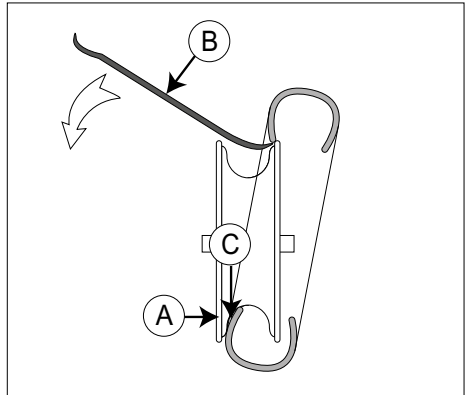

Figuur 51

Inspectie na zes maanden, daarna jaarlijks

- Controleer of de rem naar behoren werkt. Stel zo nodig bij.
- Controleer of de banden intact zijn en of de zijden niet beschadigd zijn.
- Zorg ervoor dat de rolstoel schoon is en dat alle beweeglijke onderdelen functioneren.
- Controleer de voorste zwenkwielvork op speling. Stel zo nodig bij. De as moet onbelemmerd om zijn spil draaien, maar er mag geen speling zijn in opwaartse of neerwaartse richting.
- Controleer de schroefverbindingen en stel deze zo nodig bij.



Lange termijn opslag (Meer dan vier maanden)

- Bewaar binnenshuis op een koele, droge plaats
- Tijdens de opslag mag de temperatuur niet lager zijn dan -20°C of hoger dan $+65^{\circ}\text{C}$.
- Aanbevelen luchtvochtigheid : 15 % - 93 % .
- Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de luchtdruk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische specificaties en afmetingen

De rolstoel wordt standaard geleverd met verschillende zithoogten en -breedten. De hoogte die ideaal is voor de rolstoelgebruiker is afhankelijk van twee factoren: De lengte van de gebruiker en de manier waarop de rolstoel moet worden voortbewogen. Informeer bij uw dealer of uw plaatselijke helpcenter als u vragen hebt over de juiste hoogte en breedte. (Alle afmetingen zijn in millimeter, tenzij anders aangegeven. De maten kunnen +/- 1 cm afwijken)

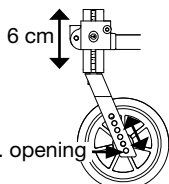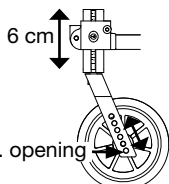Zitbreedte¹⁾		360, 390, 420, 450, 480, 510, 540 ¹⁾ , 570 ¹⁾ , 600 ¹⁾					
Zitdiepte		Standaard		Lang		Kort	
		390 (360-450)		450 (450-510)		390 (330-390)	
Zithoogte voorzijde		= positie niet van toepassing					
Vork mm	Wiel inch/ mm	Positie van de gaten in de zwenkwielvork					
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
92	4"/100	370-430	355-415				1. opening
92	5"/125	385-445					
120	4"/100	400-460	385-445	37-43			1. opening
120	5"/125	415-475	400-460	385-445			
120	6"/150	430-490	415-475	400-460			
146	4"/100	430-490	415-475	400-460			
146	5"/125	445-505	430-490	415-475	400-460		
146	6"/150	460-520	445-505	430-490	415-475		
146	8"/200	475-535	460-520				
Zithoogte achter		Aandrijfwiel			Zithoogte – achter		
		20"			360 - 440		
		22"			380 - 460		
		24"			400 - 480		
Rugleuning, hoogte		350 - 450					
Armleggers, hoogte		Standaard armleggers 170 - 240					
		Armlegger, hoogte 220 - 290					
Totale hoogte		750 - 930, Standaard 840					

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale breedte	Zitbreedte + 180
Breedte Ingeklapt	280
Totale lengte	94 - 100, Standaard 97
Gewicht van stoel	Van 18 kg
Transport-gewicht	Van 9,3 kg
Max. Gebruiker-sgewicht	135 kg (Zitbreedte 54, 57, 60: 160 kg)
Maximale helling voor parkeerrem	7°
Ontvlambaarheid	Bekledingen zijn getest en goedgekeurd in overeenstemming met: NS -EN 1021-2 : Equivalent van de lucifervlam als ontstekingsbron

1) De afmetingen van Exigo 30 met zitbreedte 54 cm, 57 cm en 60 cm overschrijden de normen voor rolstoeltoegankelijkheid. De rolstoel is daarom mogelijk niet geschikt voor gebruik in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in treinen en bussen, of voor toegang tot openbare voorzieningen zoals toiletten.

Levensduur

De rolstoel en de meeste onderdelen zijn gemaakt van een speciale aluminiumlegering. De rugleuning en zitting zijn gemaakt van vlamvertragend materiaal. De rolstoel kan worden geleverd met massieve banden of luchtbanden op zwenkwielen en aandrijfwielen.

De te verwachten levensduur van de rolstoel is bij normaal gebruik en voorgeschreven onderhoud ongeveer 7 jaar.

Verwijderingsvoorschriften

Afval van de verpakking en de onderdelen van de rolstoel kunnen, net als de rolstoel zelf, worden verwijderd als gewoon afval. Het belangrijkste bestanddeel van de rolstoel is aluminium dat geschikt is om opnieuw te worden gesmolten. De plastic- en kartonnen verpakking zijn geschikt voor recycling.

Geef aan dat elektronische/elektrische apparatuur moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Richtlijn/regelgeving elektrisch en elektronisch afval.

MERKTEKENS EN LABELS

TYPE:	Naam product, SKU nummer
	De maximale veiligheidsmarge bij hellingen met anti-tip wielen hangt onder andere af van de instellingen, postuur en fysieke capaciteiten van de gebruiker.
	Breedte zitsysteem.
	Diepte (max.)
	Maximale belasting.
	UKCA-keurmerk.
	CE-keurmerk.
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Productiedatum.
	Serienummer.
	Dit symbool betekent Medisch apparaat.
	Geeft aan dat elektronische/elektrische apparatuur moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Richtlijn/regelgeving elektrisch en elektronisch afval.
	Adres fabrikant.
ISO 7176-19:2008	Crashtest met goed gevolg doorstaan in overeenstemming met: ISO 7176-19:2008.
	Adres van de importeur
UK RP	Verantwoordelijke persoon VK
CH REP	Het adres van de vertegenwoordiger in Zwitserland

	Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany	 YYYY-MM-DD
Type: Exigo 30	Manual Wheelchair	 242200101001
ISO 7176-19:2008		
 135 kg	 6°	 450 mm
 360 mm		



ISO 7010-M002
Gebruikershandleiding/
brochure moet worden
gelezen! (Blauw icoon)



ACCESSOIRES

Aandrijf wiel en aandrijf wielbevestiging

- Aandrijf wielbevestiging met Impera-wielvergrendeling (maakt het mogelijk om de wielvluchthoek af te stellen)
- Amputatieblok
- Aandrijf wiel met verschillende afmetingen en banden – massief, hoge druk en lucht
- Hoepel met extra frictie
- Bekleding met extra frictie
- Spaakbeschermingen
- Wiel voor eenhandsbediening
- Extra rem voor begeleider

Zwenkwiel en zwenkwielbevestiging

- Zwenkwiel met verschillende afmetingen en banden – massief en lucht
- Zwenkwielvorken in verschillende afmetingen

Remmen

- Rem – op de rem zetten met lange hendel

Beensteun

- Beensteun, verstelbare hoek
- Voetplaat, verstelbare diepte
- Amputatiesteun

Rugleuning

- Comfortrugleuning Smartsit
- Duwhandgreep in hoek
- Duwhandgreep
- Duwhandgreep voor neksteun
- Neksteun

Armleggers en kledingbescherming

- Korte armleggers, standaardhoogte
- Lange armleggers, hoog
- Korte armleggers, hoog
- Hemiplegie-armlegger
- Bescherming voor kleding

Diverse accessoires

- Elektrische pomp
- Krukkenhouder
- Werkblad
- Zitkussen
- Heupgordel
- Bevestiging voor heupgordel
- Tas
- Anti-kantelstabilisator

Alle accessoires worden geleverd met montageaanwijzingen.

Neem contact op met uw Sunrise-dealer voor accessoires en reserveonderdelen.

GARANTIE

Garantie

Definities van termen

Definities van in deze garantie gebruikte termen:

- Aanbieder van de garantie: Sunrise Medical HCM B.V., Vossenbeemd 104, 5705 CL Helmond, Nederland.
- Dealer: degene die het product doorverkoopt aan de gebruiker.
- Defect: een omstandigheid waardoor het product niet stevig is of geschikt voor gebruik en die wordt veroorzaakt door gebrekkige kwaliteit van het materiaal dat gebruikt is om het product te fabriceren, of door de kwaliteit van het fabricageproces.
- Garantie: de rechten en verplichtingen zoals beschreven in dit document.
- Garantieperiode: de tijdsduur van de garantie.
- Gebruiker: degene die het product gebruikt.
- Herstelmaatregel: reparatie, vervanging of teruggave van het product.
- Klant: degene die het product rechtstreeks bij Sunrise Medical HCM koopt.
- Onderdeel: onderdeel van het product dat verwisseld of vervangen kan worden, zoals een optie, accessoire, reserveonderdeel of slijtbaar onderdeel.
- Optie: een accessoire dat door Sunrise Medical HCM wordt geleverd ter uitbreiding van het standaard productmodel.
- Product: product dat geleverd is volgens de brochure of het contract (bv. rolstoel, scooter, acculader enz.).
- Reserveonderdeel: onderdeel dat duurzaam is en bloot kan staan aan natuurlijke slijtage of natuurlijke vervuiling bij normaal gebruik tijdens de levensduur van het product.
- Retourzending: product of onderdeel dat moet worden geretourneerd.
- RMA-procedure: procedure voor het retourneren van goederen, contacteer uw dealer.
- Slijtbaar onderdeel: het onderdeel dat blootstaat aan natuurlijke slijtage of natuurlijke vervuiling bij normaal gebruik tijdens de levensduur van het product (paragraaf 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden van Sunrise Medical HCM).

In weerwil van de rechten en verplichtingen van Sunrise Medical HCM, de klant en gebruiker, zoals beschreven in de algemene verkoopsvoorwaarden van Sunrise Medical HCM, zijn de rechten van de klant en/of gebruiker jegens Sunrise Medical HCM ingeval van defecten beperkt tot de in deze garantie beschreven bepalingen. Sunrise Medical HCM garandeert dat tijdens de garantieperiode het product zonder defecten functioneert. Bij een defect is de gebruiker verplicht om - binnen twee weken na constatering van het defect - contact op te nemen met de dealer. Hij moet een retourneringsformulier invullen en het product of onderdeel retourneren via de RMA-procedure. Naar eigen goeddunken zal Sunrise Medical HCM het herstel uitvoeren dat onder de gegeven omstandigheden geschikt lijkt, binnen een redelijke tijdsperiode (hangt af van de aard van de claim) vanaf ontvangst van het ingevulde retourneringsformulier. De garantieperiode zal na het herstel niet worden verlengd.

GARANTIE

Tabel garantieperiode

Omschrijving	Garantieperiode	Voorbeelden zijn onder meer (maar zijn niet beperkt tot de hieronder genoemde onderdelen)
Frame	5 jaar	Assemblage/frame
Serviceonderdelen	Nieuw: 1 jaar na factuurdatum Hersteld: 90 dagen na factuurdatum	Remmen
Slijtbare onderdelen	40 dagen na factuurdatum	Stoffen voor zitting en rug, wielen, handvatten enz.
Opties/accessoires	2 jaar	Hoofdsteunen, beensteunen, trommelrem enz. Geen reserveonderdeel of slijtbaar onderdeel

Alleen tijdens de garantieperiode accepteert Sunrise verzend- en herstelkosten die verband houden met garantie op het hulpmiddel.

Deze garantie komt te vervallen indien:

- het product en/of de onderdelen ervan veranderd zijn of voorwerpen door anderen dan Sunrise zijn toegevoegd;
- er uiterlijke veranderingen zijn door gebruik;
- de instructies voor gebruik en onderhoud niet zijn nageleefd, het apparaat niet op de normale manier gebruikt is, er sprake is van slijtage, onachtzaamheid, bijkomende schade door veronachtzaming van eerdere symptomen, overbelasting, ongevallen door derden, het gebruik van niet-originele onderdelen, en niet door het product veroorzaakte defecten;
- er overmacht heeft plaatsgevonden (overstroming, brand enz.).

Onder deze garantie vallen niet:

- banden en binnenbanden;
- accu's (vallen onder de garantie van de accufabrikant).

Klanten en/of gebruikers hebben juridische (wettelijke) rechten onder de toepasselijke nationale wetten met betrekking tot de verkoop van consumentenproducten. Deze garantie heeft geen invloed op uw mogelijke wettelijke rechten, noch op de rechten die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, noch op rechten tegen de entiteit bij wie het product gekocht is. Klanten mogen opkomen voor rechten die zij naar eigen oordeel hebben.

Waarschuwing: De inhoud van deze gebruikshandleiding is uitsluitend informatief bedoeld. De gegevens kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en mogen daarom niet worden geïnterpreteerd als een verplichting vanwege Sunrise Medical HCM AS. Sunrise Medical HCM AS is niet aansprakelijk, wettelijk noch financieel, voor fouten of onnauwkeurigheden die kunnen voorkomen in deze gebruikshandleiding. Alle producten die in deze gebruikshandleiding worden genoemd, zijn geregistreerde handelsmerken en mogen niet zonder goedvinden van Sunrise Medical HCM AS in een andere context worden gebruikt.

AANTEKENINGEN



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@
sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@
sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr



MB3197_OM_Exigo 30_EU_NL_
Rev.F_2024-05-28