


MANUEL KØRESTOL

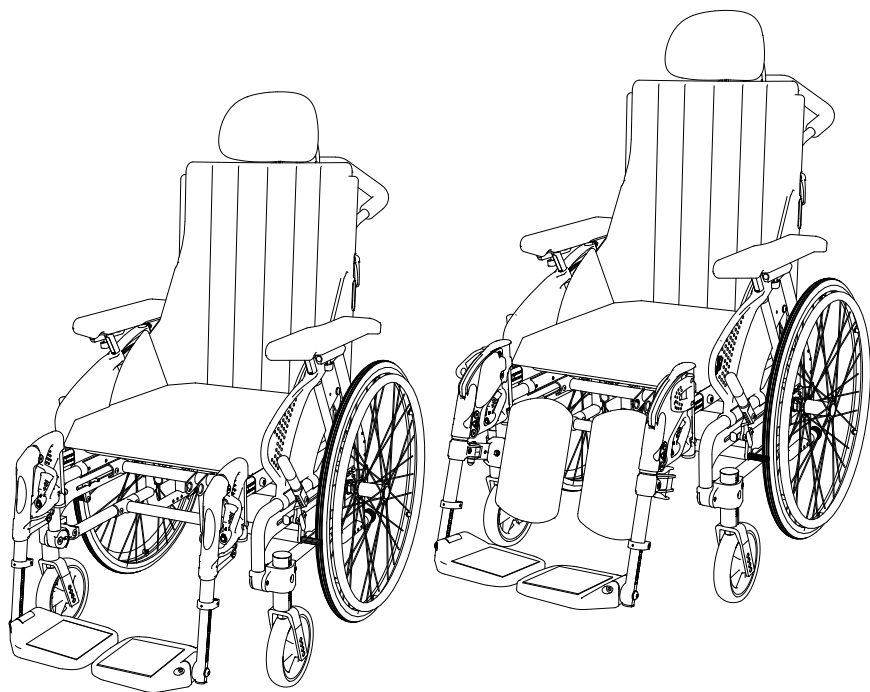

Emineo

BRUGSANVISNING

DK

 Breezy®

MB3160-DK-H

INLEDNING

Tillykke med den nye manuelle kørestol

Vi håber, De får glæde af stolen i hverdagen.

Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien.

For en sikkerheds skyld og for at få den bedste udnyttelse af mulighederne i den nye kørestol, anbefales det, at brugsanvisningen læses nøje igennem, før kørestolen tages i brug.

Tilsigtet anvendelse og tilsigtet brugermiljø

Kørestolen er udviklet til både indendørs og udendørs brug.

Brugeren

Denne kørestol er udviklet til bevægelseshæmmede personer og som en hjælp til personer med gangbesvær. Brugere, der selv kan manøvrere kørestolen ved at trille, styre og bremse den, kan bruge kørestolen uden en hjælper. Den maksimale brugervægt er 135 kg. Brugeren skal have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen, før kørestolen benyttes.

Justering af kørestolen

Den gennemsnitlige kørestolsbruger findes ikke. Derfor kan kørestole fra Sunrise Medical justeres efter brugerens specifikke behov. Indstillinger, der er nævnt i kapitlet Brug af kørestolen, kan foretages af brugeren. Alle andre justeringer, der er nævnt i denne Brugsanvisning, skal foretages af kvalificeret personale eller i samråd med kvalificeret personale.

Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i pdf-format på www.SunriseMedical.eu eller alternativt kan det stilles til rådighed i stor tekst.

Oplysninger om produktsikkerhedsmeddelelser og produkttilbagekaldelser kan findes på www.sunrisemedical.eu Kontakt din lokale autoriserede SUNRISE MEDICAL-forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende din kørestols anvendelse, vedligeholdelse eller sikkerhed. Hvis der ikke er en autoriseret forhandler i dit område, eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Sunrise Medical skriftligt eller telefonisk.

SUNRISE MEDICALs kvalitetsstyringssystem er godkendt i henhold til ISO 13485 og ISO 14001.



Som producent af denne produkt erklærer SUNRISE MEDICAL hermed, at de overholder bestemmelserne i forordningen for medicinsk udstyr (2017/745).

INLEDNING

BEMÆRK:

Generelle brugerråd.

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i personskade, beskadigelse af produktet eller skade på miljøet.

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten bor.

B4Me særlige indretninger

Sunrise Medical anbefaler på det kraftigste, at brugeren læser og forstår alle oplysninger, der leveres sammen med B4Me produktet, før produktet anvendes første gang. Dette skal gøres for at sikre, at B4Me produktet fungerer efter producentens hensigt.

Sunrise Medical anbefaler ligeledes, at oplysningerne om produktet ikke bortskaffes, når de er blevet læst, men opbevares til fremtidig brug.

Kombinationer med medicinsk udstyr

Dette medicinske udstyr kan muligvis kombineres med andet medicinsk udstyr eller et andet produkt. Information om hvilke kombinationer, der er mulige, kan findes på www.SunriseMedical.dk. Alle de angivne kombinationer er blevet valideret, så de opfylder kravene til generel sikkerhed og ydeevne, Bilag I, punkt 14.1 i Forordning om medicinsk udstyr 2017/745.

Vejledning om kombination, så som montering, kan findes på www.SunriseMedical.dk

BEMÆRK:

Bemærk venligst, at kørsel med kørestol kræver tilstrækkelige kognitive, fysiske og synsevner. Brugeren skal være i stand til at vurdere følger af handlinger under betjening af kørestolen og, om nødvendigt, korrigere dem. Disse egenskaber og sikker brug af de ekstra monterede komponenter kan ikke vurderes af Sunrise Medical som producent. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for eventuelle skader som følge heraf.

Se betjeningsvejledningen til kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Instruér brugeren i sikker brug af kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Informér brugere om specifikke advarsler, der skal læses, forstås og overholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning	2
Indholdsfortegnelse	4
Kørestolens enkelte dele	5
Montering	6
Anvendelsesområde	7
Brug af kørestolen	8
Hoftesele	30
Sikkerhed	31
Sikkerhed i bil	32
Vedligeholdelse	35
Mærkning	38
Tekniske data	39
Tilbehør	41
Garanti	42

KØRESTOLENS ENKELTE DELE


Det er vigtigt, at man kender de almindeligste betegnelser for kørestolens dele for at forstå brugsanvisningen ordentligt.

Se på tegningen samtidig med, at du finder de aktuelle dele på din egen kørestol.

Vær opmærksom på, at udstyret på stolen, kan variere noget fra tegningen, som er vist i Figur 1.

Stolen leveres i 2 udgaver: "Basic" og "One-tool". Der, hvor funktioner, indstillinger og tilpasninger er forskellige på Basic og One-tool, er det angivet i denne brugsanvisning. Hvis Emineo er monteret som hjælperbetjent stol, er den forsynet med andre størrelser af hjul og bremsehåndtag for hjælper på skubbebøjlen.

- A. Ryglæn med rygbetræk
- B. Nakkestøtte
- C. Armlæn
- D. Sidebeskyttere
- E. Sæde
- F. Benstøtte
- G. Stelside
- H. Fodplade
- I. Skubbebøjle
- J. Drivhjul
- K. Drivring
- L. Positionsblok
- M. Bremse
- N. Lejehus til svinghjul
- O. Svinghjulsgaffel
- P. Svinghjul

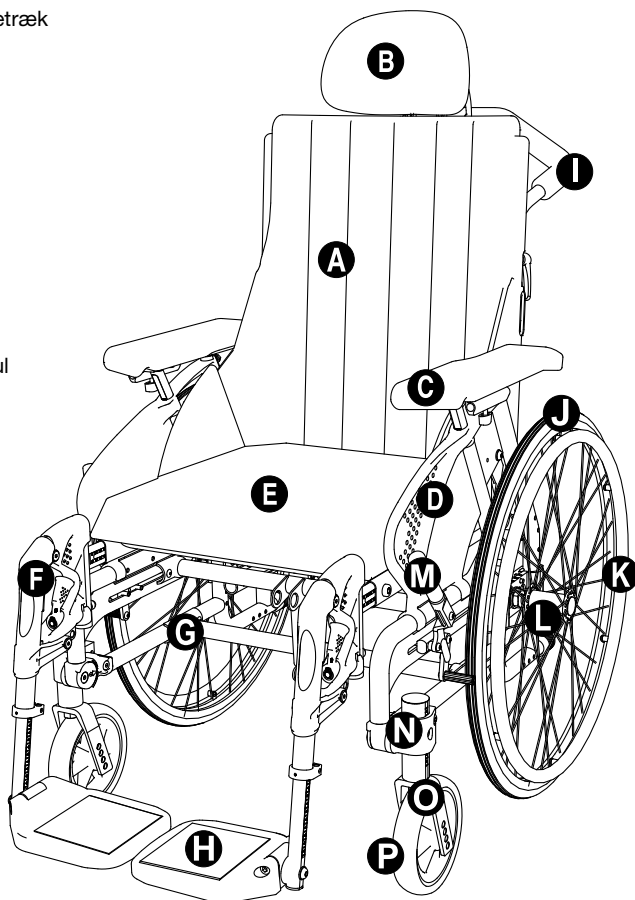

Figur 1

MONTERING

Montering Figur 2 og 3

Som standard leveres kørestolen komplet.

Det eneste du skal gøre er at:

- Klappe ryglænet op, se side 12
- Sætte armlænene på, se side 6
- Sætte benstøtterne på, se side 7


Transport

Kørestolen er egnet til land- og/eller flytransport. De af kørestolens dele, der let kan tages af, bør fjernes under transport af kørestolen.


- Armlæn
- Benstøtter
- Baghjul
- Hovedstøtte

Når kørestolen er i køretøjet, skal den sikres med et ISO 10542-godkendt fastspændingssystem, der egner sig til den pågældende kørestols vægt, inklusive eventuelt valgfrit tilbehør.

Se Sikkerhed i bil på side 30 for anvendelse af kørestolen som passagersæde i et motorkøretøj.

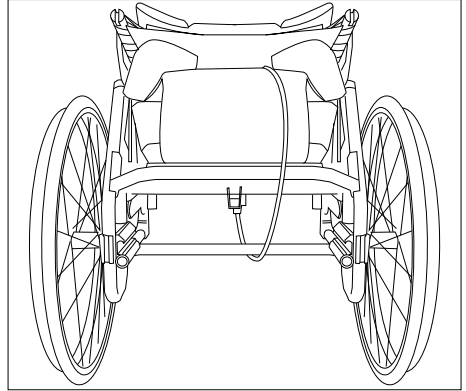

Figur 2

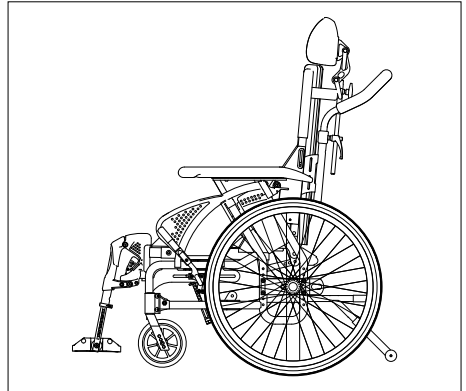

Figur 3

ANVENDELSESOMRÅDE

Indikationer

De mange forskellige monteringsmuligheder samt kørestolens modulbaserede konstruktion betyder, at denne kørestol er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af:

- Lammelse
- Tab af lemmer (benamputering)
- Deformiteter/misdannelser i benene
- Ledkontraktion/ledskader
- Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi, muskeldystrofi, hemiplegi. Desuden er kørestolen egnet til ældre personer, som stadig har kræfter i overkroppen.

Kontraindikationer

Kørestolen må ikke anvendes uden ledsager i tilfælde af:


- Perceptionsforstyrrelse
- Ubalance
- At begge arme mangler, hvis vedkommende ikke understøttes af en omsorgsperson
- Ledkontraktur eller ledskade på begge arme
- Nedsat siddefunktion

BRUG AF KØRESTOLEN

Quickrelease Figur 4

Kørestolen har quickrelease aksel på drivhjulene. Tryk ind på knappen midt i navet, når drivhjulet skal tages af eller sættes på.

OBS! Check, at drivhjulet sidder ordentligt fast. Knappen skal stikke ca. 5 mm ud, når akslen er helt inde i navet.

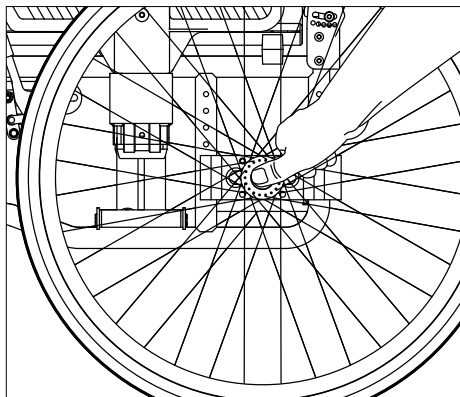


Figur 4

Højdeindstillelig skubbebøjle Figur 5

Løsn italienergrebene (5A) samtidig med, at skubbebøjlen trækkes op eller skubbes ned til den ønskede højde er opnået. Stram grebene til. For ekstra sikkerhed er skubbebøjlen forsynet med en fjeder i øverste stilling.

Skubbebøjlen kan også fjernes helt. Træk skubbebøjlen helt op- tryk fjederen (5B) ind og træk skubbebøjlen op.

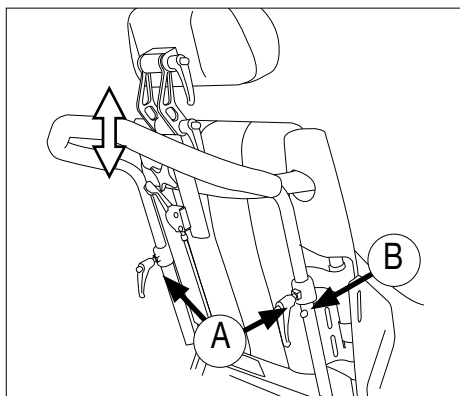


Figur 5

Armlæn, tage af og sætte på Figur 6

Løft lige op i armlænet, hvis du ønsker at tage det af. Når det skal på igen, sættes det ned i armlænsrørene.

⚠ Advarsel!

Når armlænet tages af, skal du være opmærksom på risikoen for at få fingrene eller tøjet i klemme i hjulet.

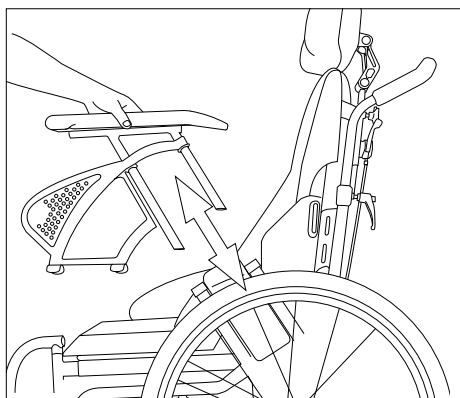

Figur 6

BRUG AF KØRESTOLEN

Svinge benstøtterne til siden / Sætte på / Tage benstøtterne af Figur 7 og 8

Frengangsmåden er ens for benstøtter med fast vinkel i knæleddet og eleverbare benstøtter.

Benstøtterne kan svinges ind og ud eller fjernes for at lette forflytninger.


Benstøtten frigøres ved at dreje håndtaget (7A) indad eller udad.

Benstøtten kan løftes op og fjernes fuldstændigt, hvis det ønskes.


Den sættes på igen ved at følge ovenstående procedure i modsat rækkefølge.

Håndtaget låser automatisk sig selv.

Hele benstøtteophænget kan tages af, se side 27.

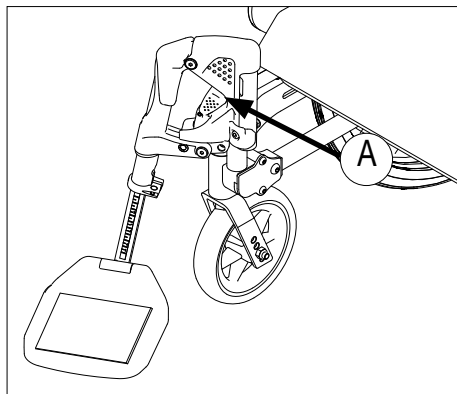

Figur 7

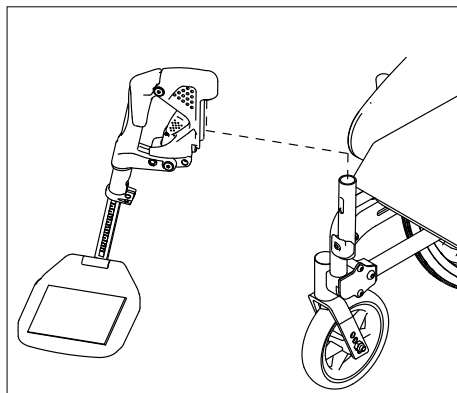

Figur 8



BRUG AF KØRESTOLEN

Brug af bremserne *Figur 9*

Bremsehåndtaget skubbes frem og ned, når stolen skal bremses.

⚠ Advarsel!

Bremserne er kun konstrueret til at bremse stolen, når den skal stå stille. Bremserne må under ingen omstændigheder anvendes som fartbremse.

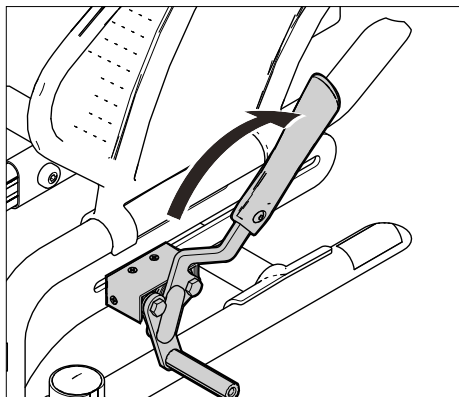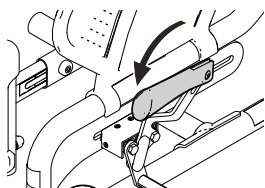


Figur 9

For at lette forflytning, kan bremsegrebet klappes ned. Dette gøres ved at trække bremsehåndtaget opad og derefter folde det ned.

Brug af bremserne på Emineo med ledsagerbetjent bremse (tilbehør)

Figur 10

- Klem ind på bremsehåndtagene (10A) for at bremse
- Ved parkering skubbes betjeningsgrebet (10B) væk fra dig selv for at sætte bremsen i låst position. Klem ind for at frigøre bremsen

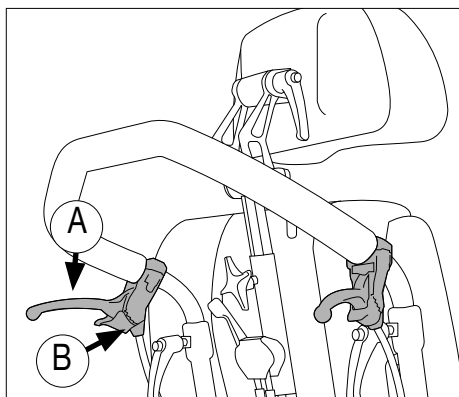

Figur 10


BRUG AF KØRESTOLEN

Tipsikring / Trædestang Figur 11 og 12


Tipsikringen vipkes ned ved at trække ud i den samtidig med, at den drejes.

Som standard er tipsikringen indstillet med en frihøjde til underlaget, som gør det muligt at forcere dørtrin og lign.

Trædestangen kan anvendes uanset om tipsikringen er klappet op eller ned.

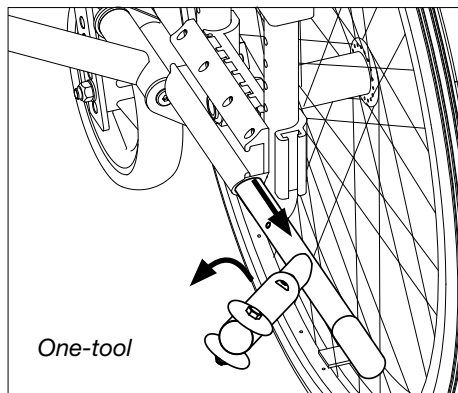

Figur 11

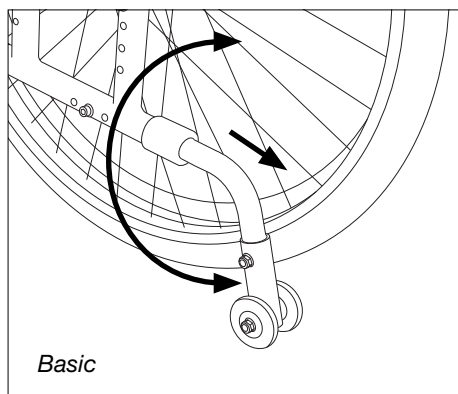

Figur 12

BRUG AF KØRESTOLEN


Sædetilt *Figur 13*

Når du tilter stolens siddeenhed, bibeholder den balancepunktet. Samtidig med, at siddeenheden tiltets bagover, åbner ryglænet sig 8°. Du kan anvende forskellige metoder til at aktivere tiltet afhængigt af dit funktionsniveau:

- Hjælperen aktiverer betjeningsgrebet og brugeren læner sig frem eller tilbage
- Hjælperen aktiverer betjeningsgrebet og brugeren trækker sig frem eller skubber sig tilbage ved hjælp af armene


Som tilbehør findes brugerbetjent betjeningsgreb, derved bliver brugeren uafhængig af hjælper og kan aktivere tiltet efter behov.

Balancepunktet på Emineo kan indstilles så det fungerer lettest muligt i forhold til brugers funktionsniveau og vægt. Se side 22.

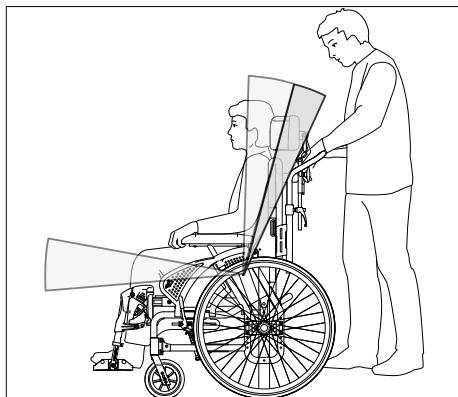

Figur 13

⚠ Advarsel Klemrisiko

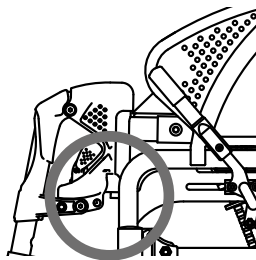

Undgå, at hænder eller lignende er placeret mellem stellet og benstøtteophænget, når stolen tiltes.


Hvis Emineo er monteret med bord, må stolen ikke tiltes, når brugeren sidder i stolen.

BRUG AF KØRESTOLEN

Indstilling af ryglæsvinkel fra betjeningsgreb (tilbehør) *Figur 14*

Indstiller ryglæsvinklen separat fra betjeningsgrebet (14A).

- Aktiver betjeningsgrebet, mens du læner dig frem eller tilbage

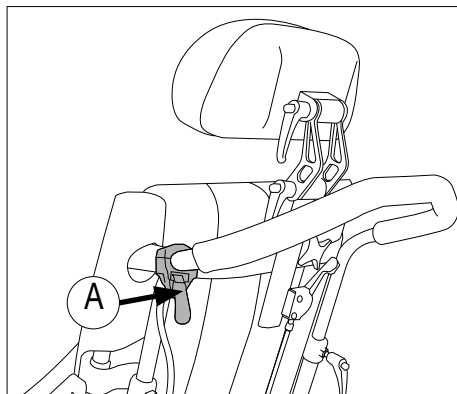


Figur 14

Elektrisk tilt og ryglæn (tilbehør) *Figur 15*


Figur 15

Tryk på håndbetjenings knapper, når stolens tilt og ryglæn skal indstilles.

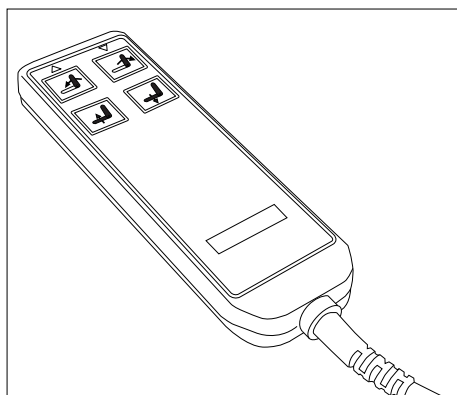

Figur 15

Ladeprocedure

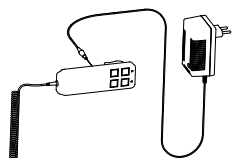

Kørestolen må ikke anvendes, mens den står til opladning. Sæt stolen til opladning, når den ikke er i brug.

Sæt ladestikket i håndbetjeningen og laderen i stikkontakten (230V). En grøn lampe lyser, når batterierne er helt opladede.

Der opfordres til at installere en røgalarm i det rum/område som hjælpemotoren oplades i. Afmonter batterierne i tilfælde af, at produktet over længere tid ikke bliver brugt.


BRUG AF KØRESTOLEN

Fælde ryglænet ned eller op


Figur 16 og 17

- Tag armlænene af
- Tilt sædeenheden helt frem. Træk ud i bolten (16A) og drej den 90° for at frigøre, slip bolten og fæld ryglænet ned frem over sædet

Følg modsat rækkefølge, når ryglænet skal klappes op igen.

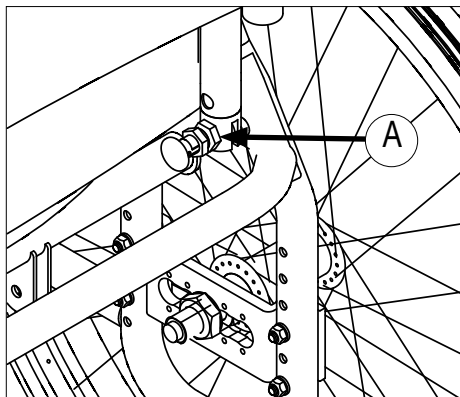

Figur 16

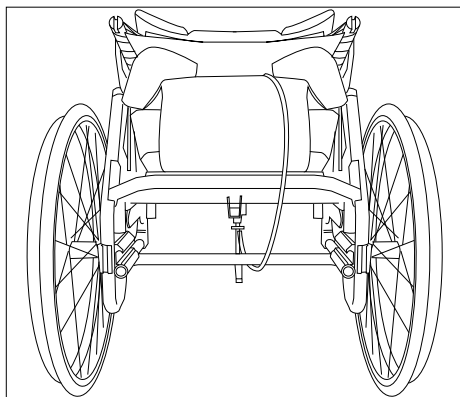


Figur 17

BRUG AF KØRESTOLEN


Forflytning ind – og ud af stolen

Figur 18, 19 og 20


- Aktiver bremserne
- Sving benstøtterne til siden eller tag benstøtterne af
- Tilt sædeenheden frem
- Brugeren kan nu forflyttes ud eller ind af stolen enten med manuelt løft, med brug af personløfter eller lige frem, hvis brugeren har ståfunktion, se Figur 18, 19 og 20

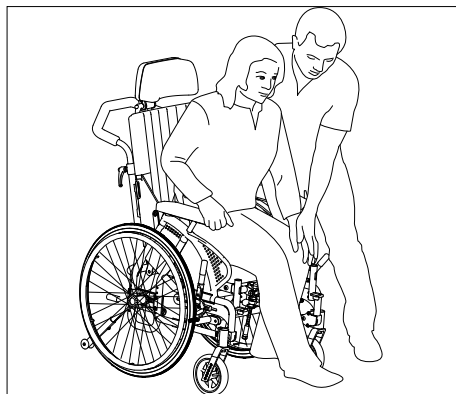

Figur 18

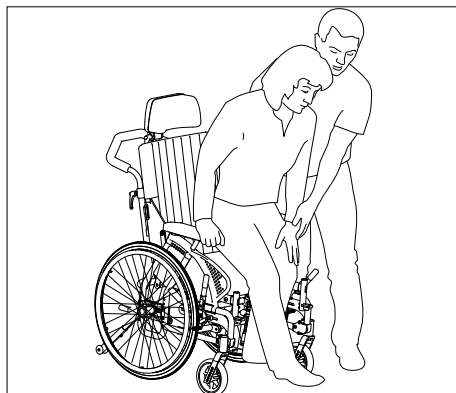

Figur 19

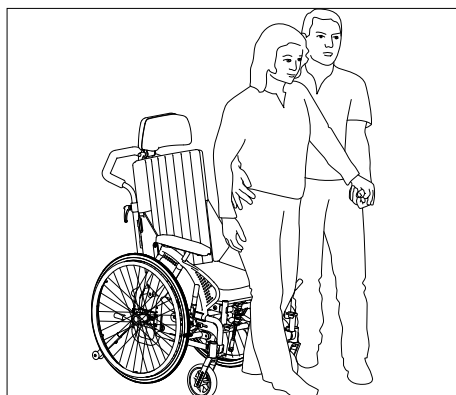


Figur 20

BRUG AF KØRESTOLEN

Forcering af forhindringer, trapper

Figur 21 og 22

Benyt de anbefalede løftepunkter på kørestolen, hvis stolen med brugeren siddende i stolen skal løftes op ad trapper. Løftepunkterne er markeret på stolen.

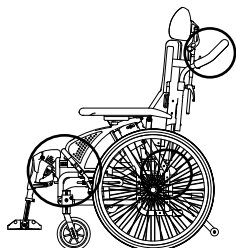

Kørestolen løftes i skubbehåndtaget, de faste benstøtter og stelsiden.


⚠ Advarsel!

Løft ikke kørestolen i armlænene.


Bemærk!

Vær opmærksom på, at den højdeindstillelige skubbebøjle er låst, før der løftes.

Bedre arbejdsstilling for hjælperne opnås ved at løfte på hver side af stolen.

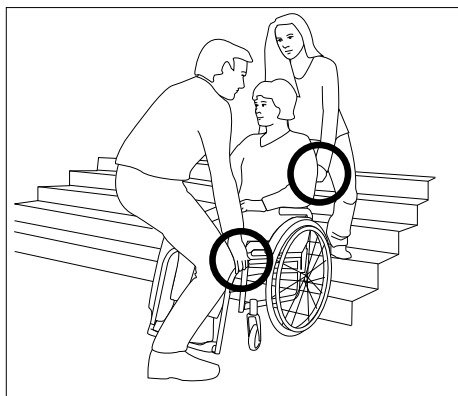

Figur 21

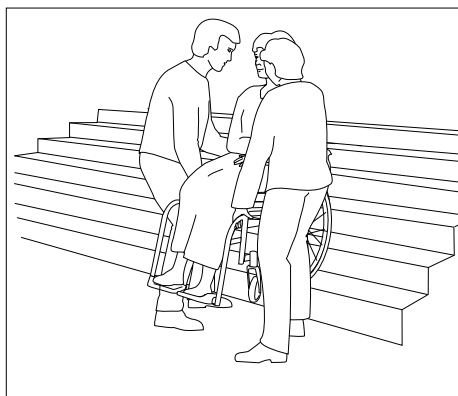

Figur 22


Forcering af forhindringer, fortovskanter

Figur 23

Sving tipsikringen op, når fortovskanter og lign. skal forceres. Sæt derefter en fod på trædestangen og vip stolen tilbage, mens der styres fra skubbebøjlen. Tilt evt. sædeenheden bagover, for at få friplads mellem forhindringen og benstøtterne.

Kuperet terræn

Ved hyppig kørsel i kuperet terræn, anbefaler vi, at der monteres en egen bremse til ledsageren.

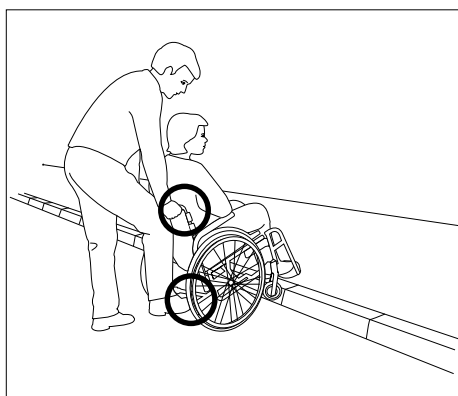

Figur 23

INDSTILLING AF KØRESTOLEN

Indstilling af sædehøjde

Sædehøjden kan indstilles højere eller lavere. De forskellige måder at indstille sædehøjden på har også indvirkning på kørestolens fremkommelighed og køreegenskaber.

Bemærk!

Indstil IKKE Emineo med forskellig sædehøjde for- og bagtil, da det kan have indvirkning på balancepunktet.

Indstilling af sædehøjde bagtil

Figur 24

Sædehøjden bagtil kan indstilles som beskrevet nedenfor.

Flytte positionsblokken op eller ned

Flyttes positionsblokken op, opnås en lavere sædehøjde. Flyttes positionsblokken ned, opnås en højere sædehøjde, se side 17.


Skifte til større eller mindre drivhjul

En større størrelse drivhjul øger sædehøjden - en mindre størrelse drivhjul sænker sædehøjden. Tabellen på side 38 viser, hvilke sædehøjder man opnår ved at skifte til anden størrelse drivhjul.

Indstilling af sædehøjde fortil *Figur 24*

Sædehøjden fortil kan indstilles som beskrevet på næste side.

Tabellen på side 38 viser, hvilke sædehøjder man opnår med de forskellige måder.

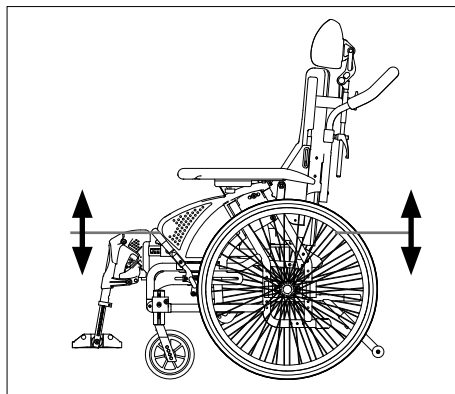

Figur 24

INDSTILLING AF KØRESTOLEN

Indstilling af sædehøjde fortil

Flytte lejehuset til svinghjulet op eller ned (One-tool) (se side 19)

- Flyttes lejehuset op, sænkes sædehøjden - flyttes lejehuset nedad, hæves sædehøjden

Flytte svinghjulet til en højere eller lavere position i svinghjulsafflen

- Flyttes svinghjulet til en højere position i svinghjulsafflen (25A), sænkes sædehøjden. Flyttes svinghjulet til en lavere position, øges sædehøjden

Skifte til større eller mindre størrelse svinghjul


- Et mindre svinghjul sænker sædehøjden, mens et større svinghjul hæver sædehøjden. Et mindre svinghjul bevirker mindre venderadius og øget fremkommelighed, hvor der er trangt med plads. Det giver også mere plads til fødderne. Et større svinghjul bevirker større venderadius, men gør det nemmere at køre på ujævnt underlag

Skifte til længere eller kortere svinghjulsaffel

- En kortere svinghjulsaffel sænker sædehøjden, giver mindre venderadius og øget fremkommelighed, hvor der er trangt med plads. Det giver også mere plads til fødderne. En længere svinghjulsaffel hæver sædehøjden og gør det muligt at skifte til andre størrelse svinghjul

Bemærk!

Husk, at indstille svinghjulenes vinkel (castervinklen), når der er ændret på sædehøjden. Husk også at indstille bremserne, når sædehøjden bagtil er ændret.

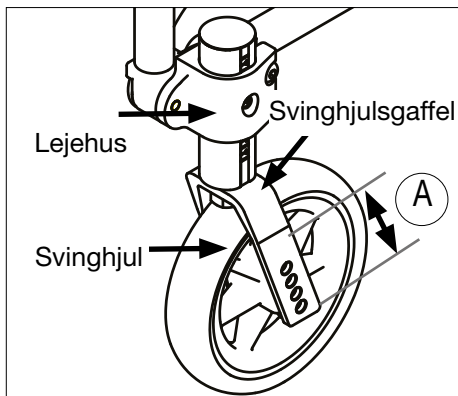

Figur 25

INDSTILLING AF KØRESTOLEN

Indstilling af sædehøjde bagtil (One-Tool) Figur 26 og 27

På stelsiderne findes et målskema (27A), som viser sædehøjde i forhold til størrelse på drivhjul.

- Tag drivhjulet af
- Løsn møtrikken (27B) med en 29 mm fastnøgle og skru den ud til den stopper
- Træk ind - og udvendige positionsblok lidt fra hinanden
- Indstil positionsblokken trinvist op eller ned i forhold til skalaen
- Klem ind - og udvendige positionsblok sammen

Bemærk!


Før møtrikken strammes, er det vigtigt at kontrollere, at tappene i positionsblokken går ind i hullerne i stellet og at hjulbøsningen lægger sig ned i sporet.

Find størrelse på drivhjulet øverst på skalaen. I kolonnen under størrelse på drivhjul fremgår det, hvor positionsblokken skal monteres for at opnå de forskellige sædehøjder.


40	38	36
42	40	38
44	42	40
46	44	42
48	46	44
24	22	20

Sædehøjder, som opnås ved de forskellige trin på skalaen

Alternative drivhjulstørrelser

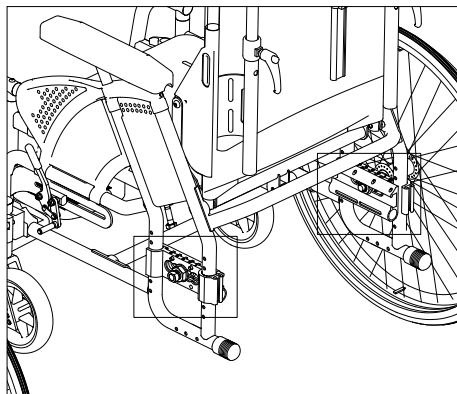

Figur 26

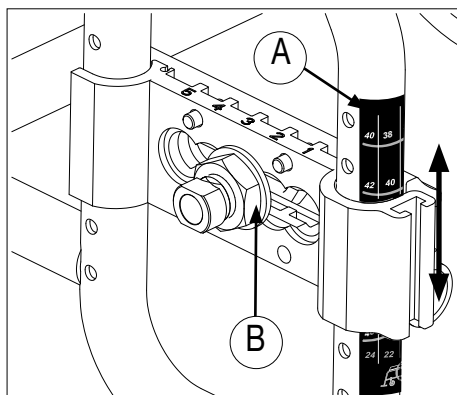


Figur 27

INDSTILLING AF KØRESTOLEN

Indstilling af sædehøjde bagtil (Basic)

Figur 28

- Tag drivhjulet af
- Løsn skruerne (28A) for at tage positionsblokken af. Anvend en 4 mm unbrakonøgle for at skrue skruerne ud og hold igen på møtrikeren med en 10 mm fastnøgle
- Flyt positionsblokken op for at opnå en lavere sædehøjde eller ned for at opnå en højere sædehøjde. Se skalaerne for at finde den rette højde
- Sæt skruerne i igen og stram til

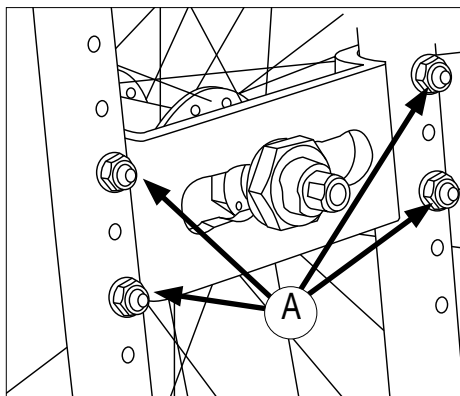

Figur 28

Indstilling af balancepunkt (One-tool) Figur 29 og 30

Der er mulighed for 5 placeringer af drivhjulet i forhold til balancepunktet.

Det er vist med en skala (29A) på positionsblokken. Placering "1" er den mest tipsikre position.

- Løsn møtrikken (29B) med en 29 mm fastnøgle og skru den ud til den stopper
- Indstil hjulbøsningen frem eller tilbage (Figur 30)

Bemærk!


Før møtrikken strammes, er det vigtigt at kontrollere, at tappene i positionsblokken går ind i hullerne i stellet og at hjulbøsningen lægger sig ned i sporet.

⚠ Advarsel!


Husk, at indstille bremserne og tipsikringen efter indstilling af sædehøjde og balancepunkt.

Bemærk!

Begynd med at indstille drivhjulene, derefter højde og vinkel på svinghjulene, når der ændres på sædehøjde og balancepunkt.

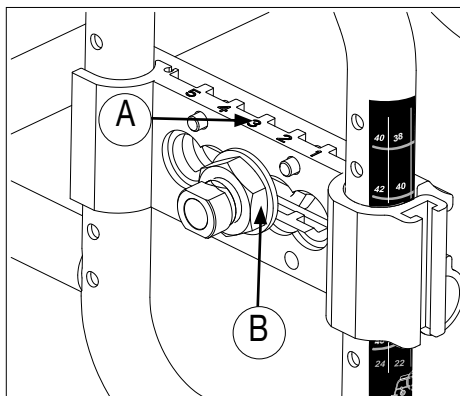

Figur 29

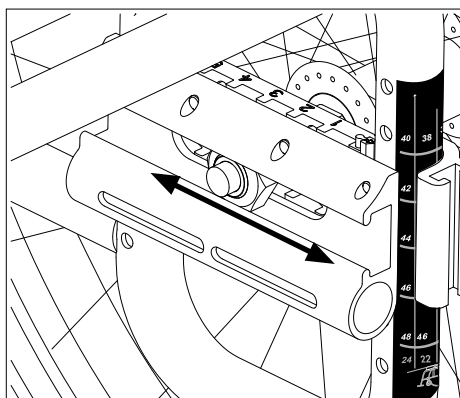

Figur 30

INDSTILLING AF KØRESTOLEN

Indstilling af balancepunkt (Basic)

Figur 31


Løsn møtrikken (31A) med en 27 mm fastnøgle samtidig med at du holder igen mod bøsningen med en 16 mm fastnøgle. Drej bøsningen (31B) 90°. Flyt bøsningen til ønskede position. Drej bøsningen 90° tilbage og stram møtrikken godt til.

⚠ Advarsel!

Husk, at indstille bremserne og tipsikringen efter indstilling af sædehøjde og tyngdepunkt.

⚠ Advarsel!


Er ryglænet monteret, så det kan vinkles op til 30° bagud, bør det bagerste hul i positionsadaptoren anvendes, for at forhindre at stolen tipper bagover.

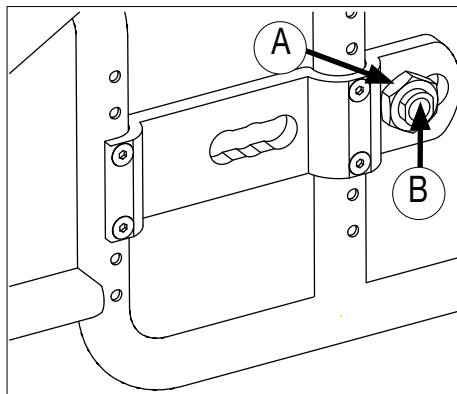

Figur 31

Indstilling af sædehøjde fortil Figur 32, 33 og 34

Indstil først højden på svinghjulene, inden vinklen indstilles.

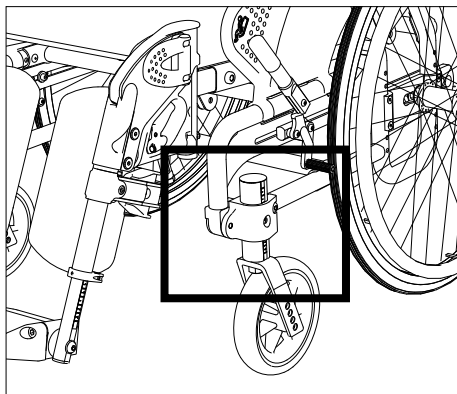


Figur 32

Indstilling af højde på svinghjul (One-tool) Figur 33

Svinghjulet har en skala fra 1-8 som hjælp til at få begge svinghjul monteret lige højt.

- Løsn skruen (33A). Benyt en 5 mm unbrakonøgle
- Indstil til ønsket højde, se skala (33B)
- Stram skruen til

Indstil ikke højden på svinghjulet udover skalaen. Tallet skal være synligt i hullet på svinghjulsfæstet.

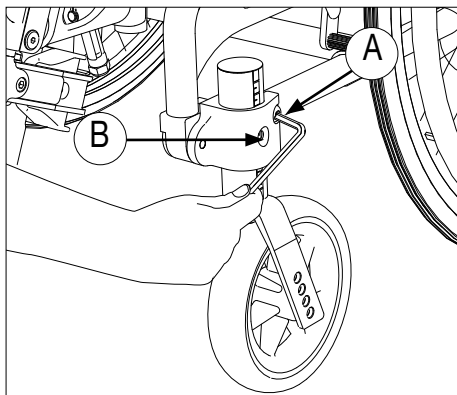


Figur 33

INDSTILLING AF KØRESTOLEN

Indstilling af vinkel på svinghjul (castervinkel) Figur 34

- Løsn skruen (34A) lidt. Anvend en 5 mm unbrakonøgle
- Løsn skruen (34B)
- Sæt unbrakonøglen ind i drejeskiven (34C) og drej til ønsket vinkel- se skala
- Stram skruen (34A) og dernæst skruen (34B)


Ved korrekt vinkel på svinghjulet, står lejehuset i lodret stilling (90°) mod underlaget. Check med en vinkel mod lejehuset/gulvet.

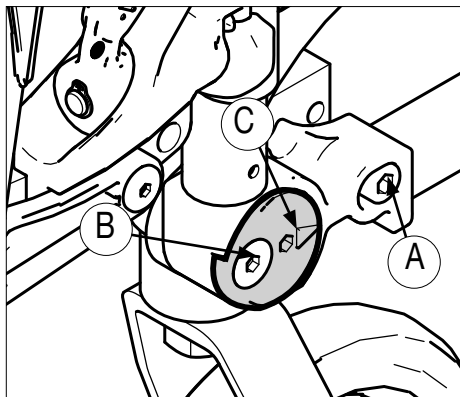

Figur 34

Flyt svinghjulet til en anden position i svinghjulsgaflen Figur 35

- Skru skruen ud (35A)
- Flyt hjulet op eller ned
- Spænd skruen (35A)

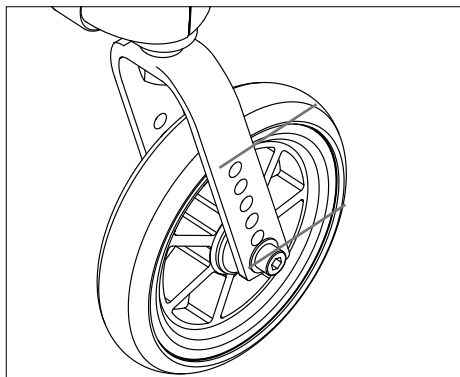

Figur 35


INDSTILLING AF KØRESTOLEN

Indstilling af ryglænsenhøjde

Figur 36

Løsn ryglænets overslag før du indstiller ryglænsenhøjden.

- Løsn skruen (36A) på hver side af rygrørene, anvend en 4 mm unbrakonøgle (skru ikke skruen helt ud)
- Ryglænet indstilles trinløst ved at trække det op eller skubbe det ned
- Se målskala for at opnå ens højde i begge sider
- Stram skruerne til igen og læg overslaget på plads

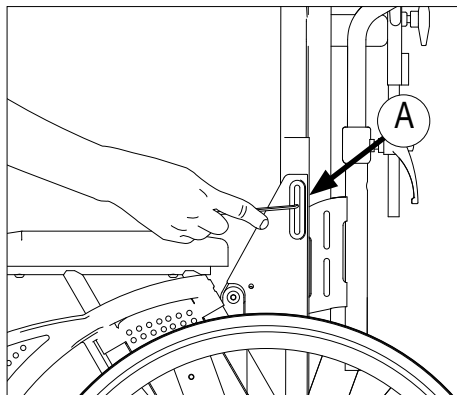

Figur 36

Indstilling af nakkestøtte (tilbehør)

Figur 37


Indstilling i dybde

- Løsn grebene (37A), foretag tilpasningen og stram grebene til igen

Indstilling i højde

- Løsn grebet (37B), hævn eller sænk nakkestøtten til ønskede højde og stram grebet til igen

Nakkestøtter med mulighed for ekstra fremflytning, ekstra sidestøtte og sideforskydning findes som tilbehør.

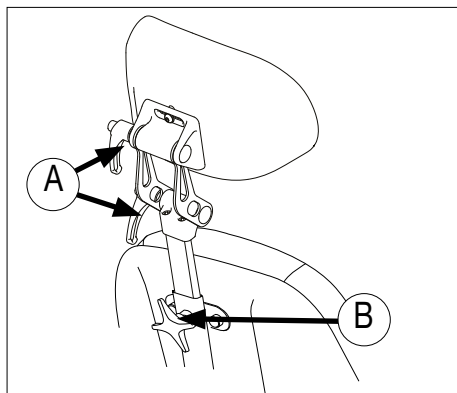


Figur 37

Indstilling af ryglænsvinkel

Figur 38

Ryglænsvinklen indstiller du fra undersiden af stolen.

- Anvend en 6 mm unbrakonøgle og en 13 mm fastnøgle og løs skruen og møtrikken (38A)
- Som standard er ryglænsvinklen 7°. Flyttes skruen til forreste hul bliver ryglænsvinklen 20°, derefter 15°, 7° og bagerste hul giver 0°
- Stram skruen til igen

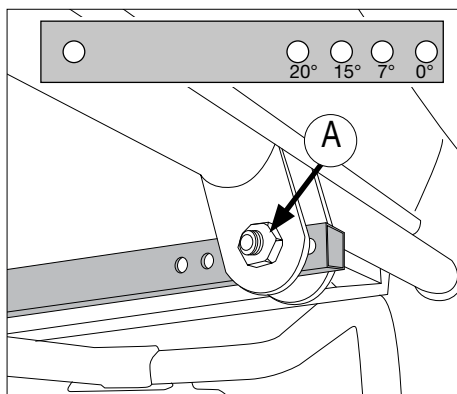

Figur 38

INDSTILLING AF KØRESTOLEN

Indstilling af sædetiltets balancepunkt

Figur 39 og 40

Indstilling af sædetiltets balancepunkt bør udføres af kvalificeret personale.


Brugere har forskellig størrelse, vægt og funktionsniveau. Det indvirker på, hvordan sædetiltet virker og hvordan det skal balanceres.

For enkelte brugere vil funktionsniveau, størrelse og vægt gøre, at det er lettere at tilte bagud end at tilte fremad. Stolens balancepunkt kan indstilles i henhold til dette.


For de fleste brugere vil det være ønskeligt med et balanceret sædetilt, dvs. det er lige let at tilte bagud og fremad.

Indstille sædetiltets balancepunkt:

- Tag armlæn og drivhjul af. Anvend en 4 mm unbrakonøgle og skrue skruen (39A) ud for at tage dækslet af. Gør det samme med dækslet på indersiden (3 mm unbrakonøgle)
- Skrue skruen (40A) ud med en 6 mm unbrakonøgle, hold igen på bagsiden med en 5 mm unbrakonøgle
- Flyt skruen til andet hul. Forreste hul gør det lettere at tilte bagud, mens bagerste hul gør det lettere at tilte fremad
- Vær opmærksom på, at du altid monterer i samme hul på begge sider af stolen. Hullerne har nr. og farvekoder både på ind- og udvendig side
- Stram skruerne og sæt dækslerne på igen

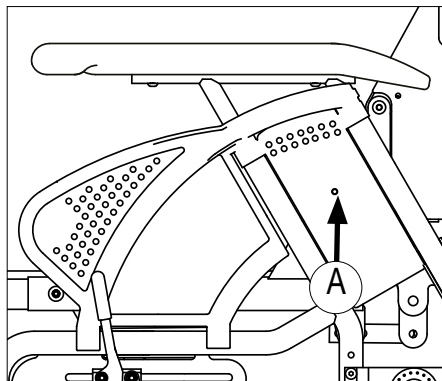

Figur 39

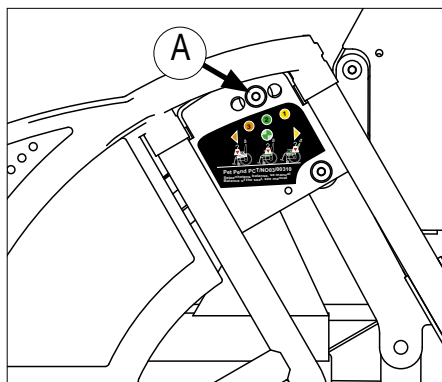

Figur 40


INDSTILLING AF KØRESTOLEN

Indstilling af rygbetræk *Figur 41*

For at opnå en behagelig siddekomfort og stabil siddestilling er kørestolen forsynet med et polstret rygbetræk med indstillelige velcrostropper. Brugeren kan sidde i stolen, mens rygbetrækket tilpasses.

Løsn overslaget på betrækket for at komme ind til velcrostropperne. De kan indstilles efter brugeres rygkrumninger og dermed være med til at yde maksimal komfort og støtte.

Hvis stolen er indstillet til lavt ryglæn, vil det øverste velcrobånd i den nederste del af ryglænet ikke være i brug- det tages i brug, hvis ryglænet indstilles op i højden.

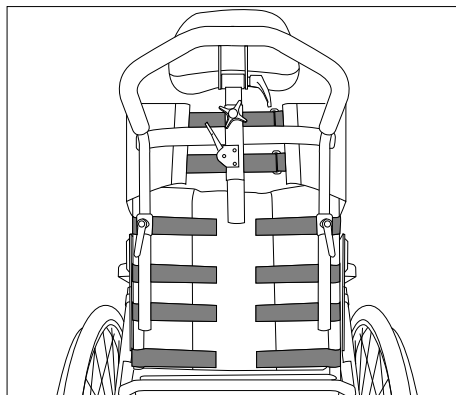


Figur 41

Indstilling af bremserne *Figur 42 og 43*


Som standard leveres kørestolen med bremser, der er tilpasset den midterste drivhjulsposition.

- Bremsen justeres ved at løsne skruen (42A)
- Flyt hele bremsen i sporet til den ønskede position. Den korrekte afstand mellem bremseklossen og hjulet (43A) er ca. 5 mm.

Ved levering af stolen er bremserne indstillet og skal normalt ikke yderligere tilpasses.

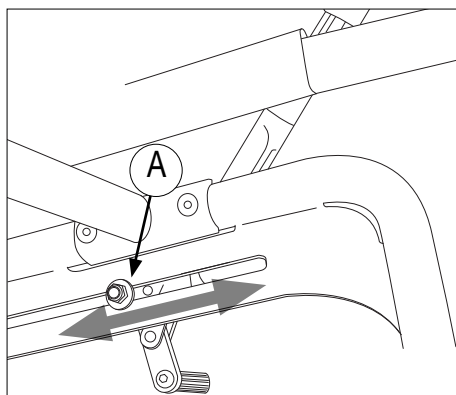

Figur 42

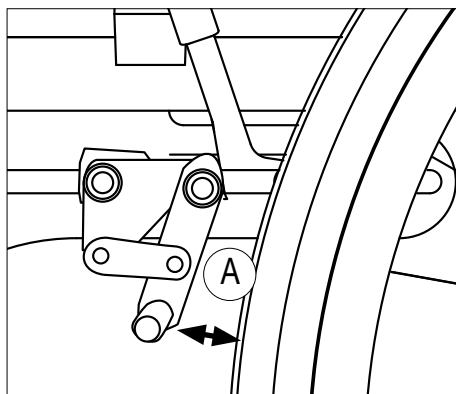

Figur 43

INDSTILLING AF KØRESTOLEN


Indstilling af tipsikring (One-tool)

Figur 44

Indstil tipsikringen, når der er ændret på stolens balancepunkt.

Løs skruen (44A) med en 4 mm unbrakonøgle. Træk eller skub tipsikringen til ønskede position på skalaen, som passer til størrelsen på drivhjulene. Stram skruen til igen.

Der må maks. være 35 mm fra enden på tipsikringen ned til underlaget. Denne højde indstilles ved at løsne skruen (44B) – træk eller skub i den nederste del af tipsikringen. Stram skruen til igen.

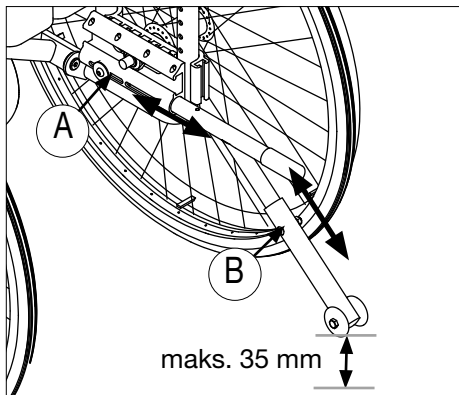


Figur 44

Indstilling af tipsikring (Basic) Figur 45

Indstil tipsikringen, når du har ændret på stolens balancepunkt.

- Løs skruerne (45A). Træk eller skub tipsikringen til den rigtige længde
- Der må maksimalt være 35 mm fra enden af tipsikringen til underlaget
- Stram skruerne igen

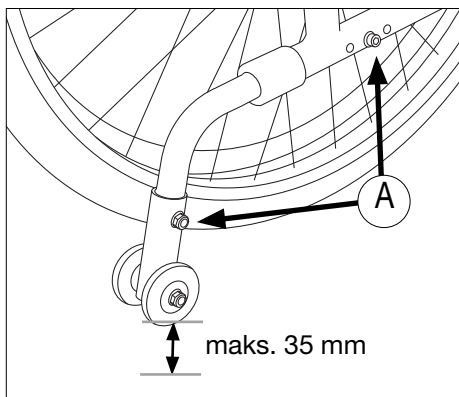


Figur 45

INDSTILLING AF KØRESTOLEN

Indstilling af benstøtterne

Figur 46

Benstøtterne er på ydersiden forsynet med en længdeskala (46A), som hjælper til med at indstille korrekt. Længden på benstøtterne indstilles ved at løsne skruen (46B). Anvend en 5 mm unbrakonøgle. Indstil til ønsket længde og stram skruen til igen.

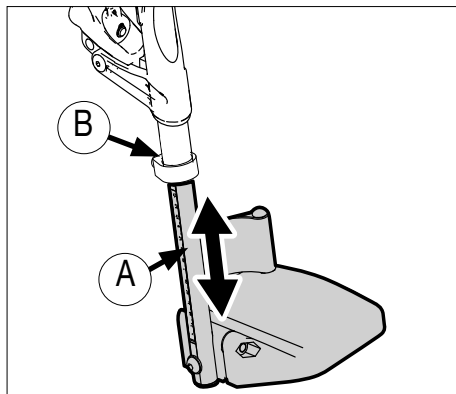


Figur 46

Indstilling af benstøttens vinkel

Figur 47

Vinklen på benstøtten kan indstilles til 70°, 80° eller 90°.

- Skru skruen ud (47A)
- Træk eller skub benstøtten til ønskede vinkel
- Sæt skruen i rette hul og stram til

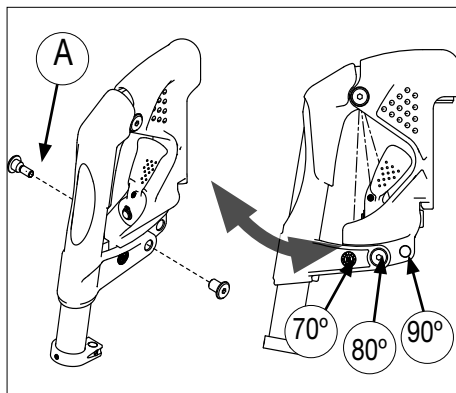


Figur 47

Indstilling af fodpladens vinkel

Figur 48

- Løsn skruen (48A)
- Drej fodpladen til ønskede vinkel og stram skruen til

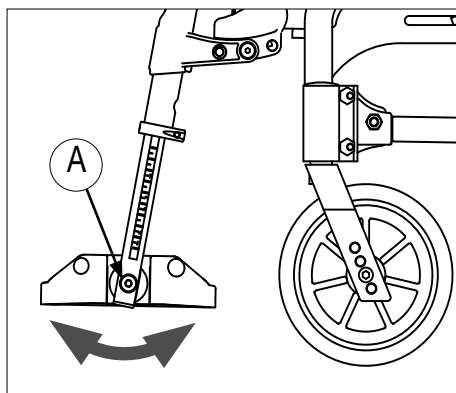

Figur 48

INDSTILLING AF KØRESTOLEN

Eleverbare benstøtter (tilbehør)

Figur 49


Indstilling af knæledsvinkel

Benstøtterne kan indstilles uafhængigt af hinanden.

- Løsn betjeningsgrebet (49A)
- Indstil til ønsket vinkel og stram grebet igen


Indstilling af lægstøtte

- Lægstøtten (49B) kan indstilles i dybde, sidevejs og i vinkel

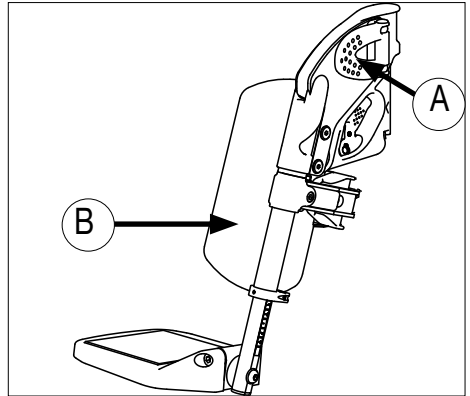

Figur 49

⚠ Advarsel! Klemrisiko

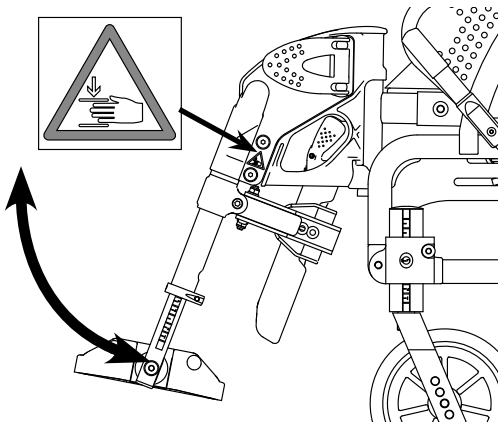


INDSTILLING AF KØRESTOLEN

Indstilling af benstøtteophæng

Figur 50

Benstøtteophænget kan indstilles i dybde eller helt fjernes.

Løsn skruen (50A) med en 4 mm unbrakonøgle. Træk eller skub benstøtteophænget til ønskede placering. Benstøtteophænget må max. trækkes 8 cm ud. Stram skruen igen.

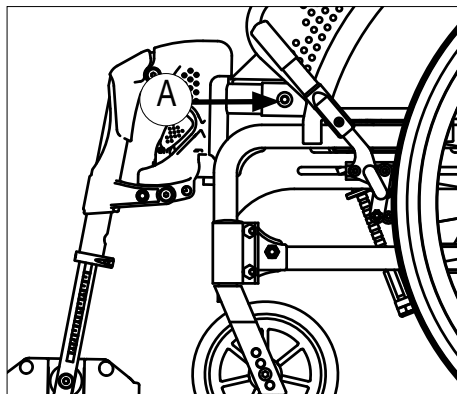


Figur 50

Indstilling af sædedybde Figur 51

Sædedybden kan trinløst indstilles. Løsn de 4 skruer med en 4 mm unbrakonøgle. Træk sædepladen fremad eller bagud. Stram skruerne igen.


Når du har indstillet sædedybden, kan det være nødvendigt at tilpasse benstøtteophænget, se ovenfor.

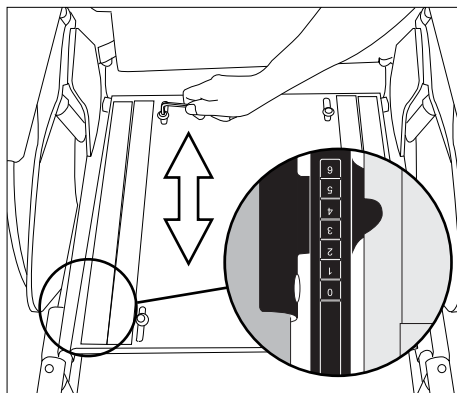

Figur 51

Indstilling af højde på armlæn Figur 52

Løsn skruen (52A) med en 10 mm fastnøgle, når højden på armlænet skal indstilles. Hæv eller sænk armlænet til ønskede højde. Aflæs højden på skalaen så samme højde opnås på begge armlæn. Skalaen viser antal cm fra sædet til øverst på armpolstret. Stram skruen til igen.

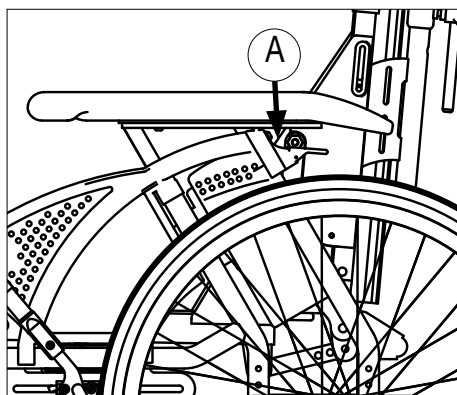

Figur 52

HOFTESELE


Montering af hoftebelte (tilbehør)

Figur 53, 54 og 55


- Skru skruen (53A) ud. Benyt en 4 mm unbraconøgle.
- Monter hoftebeltet som vist i Figur 54. Benyt skruen du fjernede.
- Kontrollér, at hoftebeltet er tilpasset korrekt til kørestolsbrugeren. Beltet skal ligge fast over hoften med en vinkel på ca. 45° fra fæstepunktet på stolen
- Vær opmærksom på, at beltet til enhver tid er rengjort og at låsemekanismen fungerer, som den skal. Belte og låsemekanisme kan rengøres med en fugtig klud

⚠ Advarsel!


Placering af beltet ovenover hoften mod det bløde væv i maven, kan føre til forkert siddestilling, hvor brugeren kan glide frem i kørestolen.

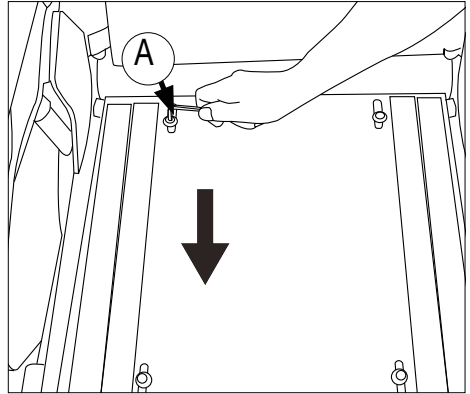

Figur 53

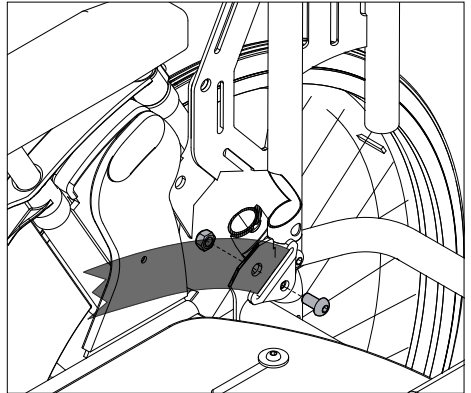


Figur 54

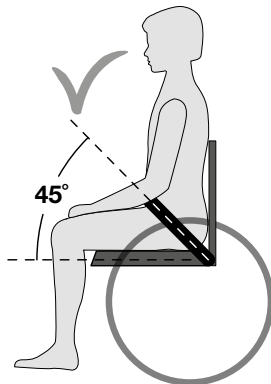

Figur 55

Rigtig placering af beltet

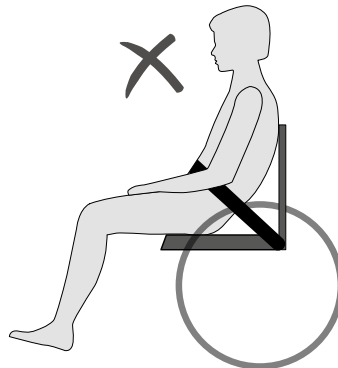

Forkert placering af beltet

SIKKERHED

- Stå ikke op eller udøv stort pres på fodpladerne.
- En kørestol er en erstatning for tabt gangfunktion. Brugere i kørestol må derfor færdes på fortov blandt gående trafikanter. Benyt reflexer på kørestolen ved færdsel udendørs, se side 30.
- Sørg for ved overflytning, at stolen står på stabilt underlag og er bremsset.
- Max. brugervægt for Emineo er 135 kg.
- Stolen bør jævnligt visuelt efterses for at kontrollere, at alle skruer, bolte, møtrikker og andre fæsteanordninger er ordentligt fastspændte.
- Sørg altid for at tipsikringen er aktiveret, når stolen er i brug.
- Justering af sædets eller hjulenes position kan indstilles ud over sikkerhedsgrænserne. Vær specielt opmærksom på, hvordan stolen reagerer, når der er ændret på indstillingerne af drivhjul, svinghjul og ryglænsvinkel. Ændringerne påvirker køreegenskaberne og vægtfordelingen i stolen.
- Undgå at udføre ændringer af eller ombygninger af stolen, idet det kan påvirke den sikkerhed, der er indbygget i stolens konstruktion.
- Det anbefales at benytte kvalificerede hjælpere ved overflytning og ud- og indstigning af stolen.
- Vær opmærksom på, at tøj, bagage, løse ting og kropsdele ikke kommer ud i drivhjulenes egere.
- Vær opmærksom på eventuel klemrisiko. Undgå at få fingrene ned mellem sidebeskyttere og drivhjul, mellem drivhjul og bremse samt mellem stelsiden og benstøtteophænget, når stolen tiltes.
- For hjælper er det vigtigt, aldrig at vippe kørestolen over en forhindring ved kun at vippe i skubbebojlen. Tryk ned med foden på den kombinerede tipsikring/trædestang samtidig med, at der trykkes moderat ned på skubbebojlen.
- Hvis brugeren sidder længe i kørestolen øges risikoen for at få tryksår. Ved høj risiko for tryksår anbefaler vi at anvende tryksårsforebyggende /- behandlende sædepude. Før der anvendes en pude til forebyggelse af tryksår, skal det kontrolleres hos leverandøren, at puden kan anvendes på en plan sædeflade.
- Vær opmærksom på, at temperaturen i metaldelene på kørestolens overflade kan blive høj, hvis kørestolen er placeret i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde.

SIKKERHED I BIL


Emineo som passagersæde i bil

Hvis det er muligt, skal kørestolsbrugeren forflyttes til bilens passagersæde og benytte bilens sikkerhedsseler. Den ubenyttede kørestol skal da placeres i bagagerummet, eller spændes fast inde i bilen.

Når Emineo benyttes som passagersæde i bil skal den stå fremad. Kørestolen skal fæstnes med de systemer, den er testet med:

Systemet er et 4 punkts fæstesystem, som er et totalsystem, som fastspænder både kørestol og bruger til bilen. Systemet kræver montering af skinner for fæstet i bilen. Fæste af bruger: 3-punkts skulder- og mavesele.

Emineo er mærket med 4 punkter (Figur 58) , som skal anvendes ved fastspænding i bil.

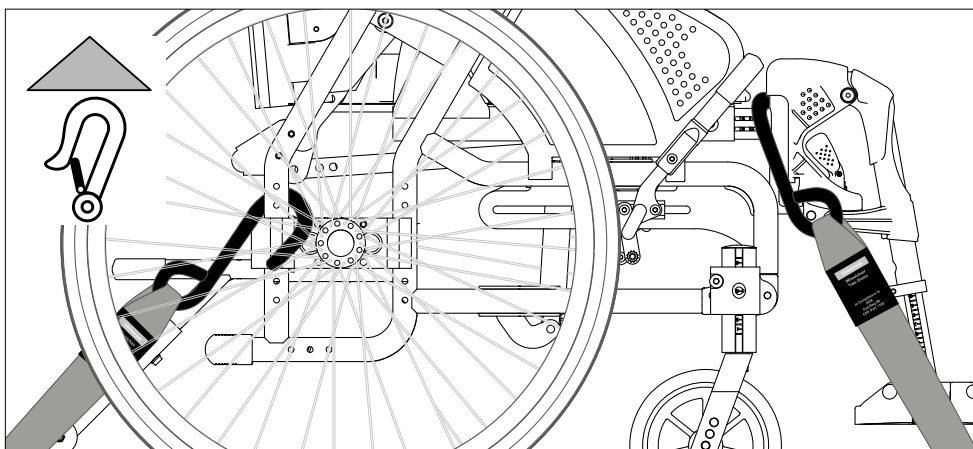


Figur 58

⚠ Advarsel! Handicare fralægger sig ethvert ansvar ved brug af Emineo som passagersæde i bil med andre fastspændingssystemer end det ovenfor nævnte.

SIKKERHED I BIL

Fæste af sikkerhedssele

- Maveselen skal fæstnes så stejlt som muligt indenfor en vinkel på 30° til 75°.
- Brystselen fæstnes over skulderen og brystet.
- Sikkerhedsselen fæstnes så tæt på kroppen som muligt og selerne må ikke være snoede.
- Vær opmærksom på, at sikkerhedsselen ikke holdes væk fra kroppen af kørestolens dele f.eks. armlæn og hjul. Se Figur 59 for korrekt placering.
- Stolen må ikke være tiltet bagud, når den benyttes som passagersæde i bil.

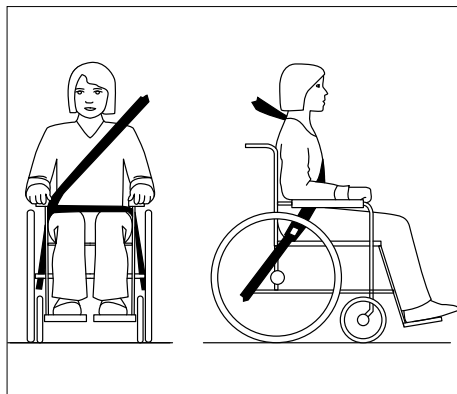

Figur 59



ADVARSEL

- a) Hvis det er muligt, skal kørestolen placeres i fremadvendt stilling og fæstnes i.h.t. instruktionerne fra producenten af fæstesystemet.
- b) Denne kørestol er godkendt som passagersæde i bil og opfylder kravene for fremadvendt transport. Kørestolen er ikke testet for andre placeringer i bil.
- c) Kørestolen er dynamisk testet i en fremadvendt stilling med brugeren fæstnet med både mave- og brystsele (3-punkts sikkerhedssele).

SIKKERHED I BIL

- d) Både mave- og brystsele bør anvendes for at mindske mulighederne for skader af hoved og brystkasse ved sammenstød med bilens andre dele.
- e) For at mindske mulighederne for skade på brugeren, skal bord, som er monteret på kørestolen og som ikke er designet for crashsikkerhed:
 - Fjernes og sikres separat i bilen
 - Fastgøres til kørestolen og monteres med energiabsorberende polstring mellem bord og brugeren
- f) Når det er muligt, skal kørestolens andet tilbehør enten være gjort fast til kørestolen eller tages af og sikres et andet sted i bilen, så det ikke løsner sig og påfører skade på brugeren ved en kollision.
- g) Støtte - og siddekorrigerende udstyr må ikke anses som sikkerhedsudstyr/ sikkerhedssele, hvis de ikke er mærkede i.h.t. kravene i ISO 7176-19-2008.
- h) Kørestolen bør inspiceres af en repræsentant for producenten inden den igen tages i brug efter at have været involveret i en kollision.
- i) Der må ikke laves ændringer eller udskiftninger i fæstepunkterne på kørestolen eller på konstruktions- steldele uden at producenten er rådført.
- j) Ved brug af elektriske kørestole i bil skal der benyttes gel-fyldte batterier.

VEDLIGEHOELDELSE

Vedligeholdelse, som er omtalt i dette afsnit, kan udføres af brugeren.

Vedligeholdelse udover dette bør foretages af teknisk kvalificeret personale fra Handicare eller i hjemkommune. Ved tvivl bør henvendelse ske til hjemkommunen.

Vask af stel

Stellet bør afvaskes jævnligt med mildt sæbevand. Ved fastgroet snavs kan der også benyttes affedtningsmiddel og derefter aftørres med en klud. Kørestolens stel kan spules med f.eks. en højtryksrenser. Forsøg at undgå at spule direkte på kuglelejerne. Aftør kørestolen grundigt efter rengøring eller efter en regnvejrstur. Bevægelige led/dele bør smøres regelmæssigt.

Hygiejneprocesser ved genanvendelse:

Der skal til dette formål anvendes et, i dit land, anbefalet desinfektionsmiddel, som bruges til hurtig, alkoholbaseret desinfektion af medicinske hjælpemidler og medicinsk udstyr, når der kræves et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel. Producentens vejledning skal følges nøje under anvendelsen af desinficeringsmidlet.

Det kan ikke garanteres, at sømme kan desinficeres fuldstændigt. For at undgå mikrobakteriel kontaminering anbefales det derfor, at sædet og rygpolstringen kasseres i henhold til lokale retningslinjer om beskyttelse mod infektion.

Rengøring af sæde- og rygbetræk

Sæde- og rygbetræk kan vaskes i vaskemaskine ved 60°. Se vaskeanvisning på de enkelte dele.

Forhold, som kan være skadelige for kørestolen

Stolen bør ikke anvendes ved temperaturer under -35°C eller over 60°C. Der stilles ingen krav m.h.t. luftfugtighed og lufttryk. Ved opbevaring stilles ingen yderligere krav.

Skruer og møtrikker

Skruer og møtrikker kan løsne sig over tid. Kontrollér derfor jævnligt, at alle skruer og møtrikker er ordentligt fastspændte. De skal evt. efterspændes. Blå Locktite nr. 243 kan benyttes som sikring. Har låsemøtrikkerne været afmonteret flere gange mister de noget af deres låseevne. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at de udskiftes.

Drivhjul

Drivhjule er forsynet med eger. Mindst 1 gang om året bør egerne efterspændes. Kontakt den lokale cykelhandler.

Quickrelease

Akslerne med quickrelease skal regelmæssigt efterses. Kontrollér, at "kuglerne" fungerer, som de skal og smør dem jævnligt med syrefri olie, f.eks. symaskineolie. Akslerne skal tørres af og jævnligt smøres med syrefri olie. Brug evt. olie på spray.

VEDLIGEHOELDELSE

Anbefalet lufttryk

Stolen kan leveres med faste ringe eller luftfyldte drivhjul.

Find størrelse på drivhjul. Aflæs derefter anbefalet maksimalt lufttryk i tabellen. Vær opmærksom på, at et højt lufttryk gør stolen lettere at køre, men et lavt lufttryk giver mere affjedring.

For at få optimale køreegenskaber bør lufttrykket jævnligt kontrolleres.

	kPa	Bar	PSI
Drivhjul, luft	350	3,5	50
Drivhjul, højtryk	630	6,3	90
Svinghjul, 6" luft	250	2,5	35
Svinghjul, 8" luft	250	2,5	36

Værktøj til service og vedligeholdelse af kørestolen

Indstilling af:	Værktøj:	Indstilling af:	Værktøj:
Bremser	Unbrakonøgle 5 mm	Ryglænsenhøjde	Unbrakonøgle 4 mm
Balancepunkt	Unbrakonøgle 3, 4, 5, og 6 mm	Rygvinkel	Unbrakonøgle 6 mm og fastnøgle 13 mm
Castervinkel	Unbrakonøgle 4 mm (Basic) Unbrakonøgle 5 mm (One-tool)	Balancepunkt	Fastnøgle 27 mm (One-tool) Unbrakonøgle 4 mm og fastnøgle 10 mm (Basic)
Sædedybde	Unbrakonøgle 4 mm	Sædehøjde bag	Fastnøgle 27 mm (One-tool) Unbrakonøgle 4 mm og fastnøgle 10 mm (Basic)
Benstøtte-længde	Unbrakonøgle 5 mm		
Fodplader	Unbrakonøgle 5 mm		
Tipsikring	Unbrakonøgle 4 mm (Basic) One-tool Unbrakonøgle 4 mm og fastnøgle 10 mm (Basic)	Sædehøjde fortil	Unbrakonøgle 5 mm
		Armlænsenhøjde	Fastnøgle mm

Første eftersyn efter 6 måneder, derefter hver 12. måned

- Check, at bremserne fungerer, som de skal. Justeres efter behov.
- Check, at dækkene har det rigtige lufttryk, og at der ingen skader/slitage er på dækkene.
- Sørg for at kørestolen er ren, og at alle bevægelige dele fungerer.
- Check for slør på svinghjulsgafferne. Indstil, hvis nødvendigt. Ophænget skal løbe frit rundt om sin egen akse, og der må ikke være slør i retningen op/ned. Udskift, hvis nødvendigt.
- Kontrollér og evt. efterspænd skrueforbindelser.

Reparationer

Udover mindre reparationer på overfladen, udskiftning af dæk, slanger og indstilling af bremses, bør alle reparationer foretages af teknisk kvalificeret personale fra Handicare eller i din hjemkommune.

For information om reparation og service kontakt din hjemkommune.

Langtidsopbevaring (mere end fire måneder)

- Opbevares indendørs på et køligt, tørt sted
- Under opbevaring må omgivelsestemperaturen ikke være lavere end -20 °C eller højere end +65 °C.
- Anbefalet luftfugtighed: 15-93 %.
- Ingen begrænsninger med hensyn til lufttryk.


Udskiftning af luftfyldte dæk *Figur 60*

Demontering af dæk

- Tag hjulet af, luk luften ud ved at holde den lille tap i ventilen inde, eller ved at skrue ventilen ud.
- Sørg for, at kanten på dækket ligger godt nede i fælgens indvendige fordybning (60A).
- Kræng kanten på dækket over fælgkanten. Brug specielle dækjern (60B), hvis nødvendigt. Pas på, at slangen ikke kommer i klemme mellem dækjernet og fælgkanten.
-

Montering af dæk

- Læg slangen ind i det nye dæk og påfør "friktionsnedsættende" middel (middel til dækmontering eller sæbe) på kanten af dækket (60C).
- Sørg for at kanten på dækket lægges godt nede i fælgens fordybning på den ene side. Kræng dækket over kanten. Pas på, at slangen ikke kommer i klemme.
- Fyld luft i til rette lufttryk og monter hjulet på stolen.

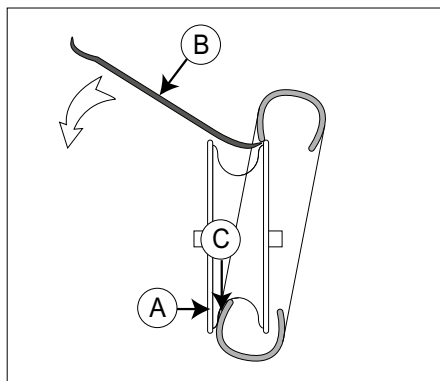

Figur 60

MÆRKNING

TYPE:	Produktnavn/SKU-nummer.
 max X°	Maksimal sikker hældning med antitipstøtter monteret, Afhænger af kørestolens indstilling, holdning og brugerens fysiske evner.
 XXX mm	Sædebredde.
 XXX mm	Dybde (maksimalt).
 XXX kg	Maksimal belastning
UK CA	UKCA-mærkat.
CE	CE-mærkat.
	Se brugsanvisningen.
 XXXX-XX-XX	Produktionsdato.
SN	Serienummer.
MD	Dette symbol betyder medicinsk udstyr.
	Angiver, at elektrisk/elektronisk udstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet/regulativet.
	Producentens adresse
ISO 7176-19:2022	Kollisionstestet til: ISO 7176-19:2022.
	Importørens adresse
UK RP	Ansvarlig person i Storbritannien
CH REP	Adresse på repræsentant i Schweiz

		 Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		 yyyy-mm-dd	
Type: Emineo		Manual Wheelchair		SN 242200101001	
ISO7176-19:2022					
 135 kg	 max 6°	 390mm	 450mm		
					
					



ISO 7010-M002
Brugermanualen/Dette hæfte skal læses!
(Blåt ikon)



TEKNISKE DATA

Tekniske data og mål

Kørestolen leveres standard i forskellige sædehøjder og sædebredder. Hvilken sædehøjde, der passer til brugeren afhænger af 2 forhold: Brugerens højde og hvordan stolen skal køres. Få råd hos Handicare eller i din hjemkommune, hvis du er usikker på, om du har fået korrekt sædehøjde og sædebredde. (Mål er opgivet i mm, hvis andet ikke er nævnt. De opgivne mål kan variere +/-10 mm)

Sædebredde	Emineo: 390, 420, 450, 480 og 510 Emineo S: 420 Emineo K: 330 og 360		
Sædedybde	Emineo: 390 - 450 Emineo S: 340 - 400 Emineo K: 340 - 400		
Sædehøjde fortil	Tabellen viser sædehøjde fortil angivet i cm ved forskellige hjulplaceringer i svinghjulsgaflen og ved forskellige størrelser på svinghjul og svinghjulsgafler. I One-tool udgaven er der desuden mulighed for at hæve eller sænke svinghjulsgaflen.		

Gaffel	Svinghjul	One-tool	Basic
92 mm	4"/100 mm	360-420	360-380
92 mm	5"/125 mm	280-440	380
120 mm	5"/125 mm	380-460	380-420
120 mm	6"/150 mm	400-460	400-420
146 mm	5"/125 mm	380-480	380-440
146 mm	6"/150 mm	380-480	400-460
146 mm	8"/200 mm	440-480	460-480

Sædehøjde bagtil	Drivhjul	Sædehøjde bagtil
	20"	360 - 440
	22"	380 - 460
	24"	400 - 480
Ryghøjde	500 - 600	
Rygvinkel	90° - 121°	
Sædetilt	0° - 16°	
Armlæn, højde	230 -330	
Skubbebøjle	90 - 110	
Total højde	115	
Total bredde	One-tool: Sædebredde +230 Basic: Sædebredde +200	

TEKNISKE DATA

Total længde	1000
Stolens vægt	Fra 27 kg
Transport-vægt	Fra 18 kg
Transport-bredde	Sædebredde + 185
Transport-højde	Fra 710
Maks. brugervægt	135 kg
Maks. hældning for parkeringsbremsen	7°
Antændelighed	Tekstilerne er testet og godkendt i overensstemmelse med: DS-EN 1021-2: Antændelseskilde svarende til tændstikflamme

Levetid

Kørestolen er overvejende fremstillet i en speciallegering af aluminium. Ryg- og sædebetræk er i flammehæmmende materiale. Alternativt kan sving- og drivhjul leveres med massive /luftfyldte dæk.

Ved normalt brug, og med den foreskrevne vedligeholdelse er kørestolens forventede levetid ca. syv år.

Brugsområder

Emineo er beregnet til både inden- og udendørs brug. Stolen er udviklet til personer med nedsat muskelkraft, nedsat bevægelighed, nedsat mobilitet og nedsat stabilitet.

Affaldshåndtering

Affald i forbindelse med emballage, dele til kørestolen samt selve kørestolen kan behandles som almindeligt affald. Hovedbestanddelen af kørestolen er aluminium, som har gode omsmeltnings-/genbrugsmuligheder. Plast og karton i forbindelse med emballage kan genbruges.

Angiver, at elektrisk/elektronisk udstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet/regulativet.

TILBEHØR

Drivhjul og drivhjulmontering

- Drivhjulsmontage med Impera positionsblok (giver mulighed for indstilling af cambervinkel)
- Amputationsbeslag
- Drivhjul med forskellige dimensioner og dæk – massive, højtryk og luft
- Enhåndsdraft
- Friktsionsdrivring
- Drivringeovertrek
- Egerbeskyttere
- Drivhjul 20", 22" og 24" med ledsagerbremse
- Transporthjul 12" og 16" med ledsagerbremse
- Quickrelease til nedsat håndfunktion

Svinghjul og svinghjulsmontage

- Svinghjul med forskellige dimensioner og dæktyper- massiv og luft
- Svinghjulsgafler i forskellige længder

Bremser

- Bremse, træk for at bremse
- Benstøtter
- Eleverbar benstøtte
- Fodplade, dybdeindstillelig
- Amputationsbenstøtte

Ryglæn

- Smartsit modul
- Nakkestøtter i forskellige udgaver
- Sidestøtter
- Brugerbetjent tilt
- Indstillingsmekanisme for uafhængig indstilling af ryglænet

Armlæn og sidebeskyttere

- Armlæn med kort armpolster
- Hemiplegiarmlæn

Diverse tilbehør

- Gasfjeder til tilt
- Sidepuder, for at mindske sædebredden
- Pumpe, elektrisk
- Stokkeholder
- Bord
- Sædepude
- Hoftesele
- Sædetaske

Ved levering af tilbehør, følger monteringsanvisning med.

Kontakt Sunrise ved bestilling af tilbehør og reservedele

GARANTI

Garanti

Ordforklaring

Forklaring af ord, som er brugt i denne garanti:

- **Forbrugsdel:** Del, som udsættes for almindeligt slid eller almindelig tilsmudsning under normal drift i løbet af produktets brugstid.
- **Kunde:** Dem, som køber produktet direkte fra Sunrise Medical.
- **Afhjælpning:** Reparation, udskiftning eller tilbagebetaling af produktet
- **Forhandler:** Dem, som videresælger produktet til brugeren
- **Mangel:** Enhver omstændighed, grundet hvilken produktet ikke er forsvarligt eller egnet til at bruge på grund af et kvalitetsproblem med det materiale, som er brugt til at fremstille produktet med, samt kvaliteten af fremstillingsprocessen
- **Ekstraudstyr:** En tilbehørsdel, som Sunrise Medical leverer for at udvide standardproduktmodellen
- **Produkt:** Det produkt, som leveres i henhold til brochure eller kontrakt (f.eks. kørestol, scooter, batterioplader osv.)
- **Del:** Del af produktet, som kan udskiftes. Dette kan være et ekstraudstyr, en tilbehørsdel, reservedel eller forbrugsdel
- **Tilbagelevering:** Produkt eller den del, der skal leveres tilbage
- **Brugervejledningens RMA-proces:** Processen for tilbagelevering af varer. Kontakt din forhandler
- **Servicevejledningens RMA-proces:** Processen for tilbagelevering af varer. Kontakt Sunrise Medical's kundeservice
- **Reservedel:** Del, som er holdbar, men som udsættes for almindeligt slid eller almindelig tilsmudsning under normal drift i løbet af produktets brugstid
- **Bruger:** Dem, som bruger produktet
- **Garanti:** De rettigheder og forpligtelser, som er anført i dette dokument
- **Garantiperiode:** Den tidsperiode, under hvilken garantien gælder
- **Garantiudsteder:** Sunrise Medical.

Uanset de rettigheder og forpligtelser for Sunrise Medical, kunden og brugeren, som er anført i Sunrise Medical generelle salgsvilkår og -betingelser, er kunden og/eller brugerens rettigheder over for Sunrise Medical i tilfælde af mangler begrænset til de bestemmelser, der er anført i denne garanti. Sunrise Medical garanterer i hele garantiperioden, at produktet er fri for mangler.

I tilfælde af eventuelle mangler skal brugeren – inden for to uger efter at have opdaget manglen – kontakte forhandleren. Vedkommende skal udfylde en tilbageleveringsformular og levere produktet eller delen tilbage via RMA-processen. Sunrise Medical vil efter eget skøn foretage den afhjælpning, som de finder passende under de givne forhold inden for en rimelig tidsperiode (afhænger af klagens karakter) fra modtagelse af den udfyldte tilbageleveringsformular. Garantiperioden forlænges ikke efter en afhjælpning.

GARANTI

Skema for garantiperiode

Beskrivelse	Garantiperiode	Eksempler omfatter, men er ikke begrænset til, de dele, som er nævnt nedenfor
Stel	5 år	Svejsninger på stel
Reservedele	Nye: 1 år efter faktura Reparerede: 90 dage efter faktura	Bremser
Forbrugsdele	40 dage efter faktura	Tekstiler på sæde og ryglæn, hjul, håndtag osv.
Ekstraudstyr/tilbehør	2 år	Hovedstøtter, fodstøtter, tromlebremser osv. Er ikke reservedele eller forbrugsdele.

Sunrise Medical betaler kun for fragtafgifter og afhjælpningsomkostninger, der er relateret til garantien, på udstyr i garantiperioden.

Denne garanti er ugyldig i tilfælde af:

- At produktet og/eller dets dele er blevet ændret, eller der er tilføjet elementer af andre end Sunrise Medical
- Ændringer i det kosmetiske udseende ved brug
- Manglende overholdelse af brugsvejledningen eller vedligeholdelsesinstruktionerne, ikke almindelig brug, slid, uagtsomhed, følgeskadevirkninger fra forsømmelse af tidligere symptomer, overbelastning, tredjepartsulykker, anvendte ikke-originale dele og mangler, der ikke er forårsaget af produktet
- Omstændigheder uden for vores kontrol (oversvømmelse, brand osv.).

Denne garanti dækker ikke:

- Dæk og indvendige slanger
- Batterier (dækkes af batteriproducentens garanti).

Kunder og/eller brugere har juridiske (lovfæstede) rettigheder i henhold til gældende national lovgivning i forbindelse med salg af forbrugerprodukter. Denne garanti påvirker ikke de lovfæstede rettigheder, som du kan have, eller de rettigheder, som ikke kan undtages eller begrænses, eller rettighederne over for den enhed, fra hvilken produktet blev købt. Kunder kan gøre eventuelle rettigheder, som de har, gældende efter eget skøn.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@
sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@
sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

