


RENGJØRINGSBESKRIVELSE

GEMINO 60

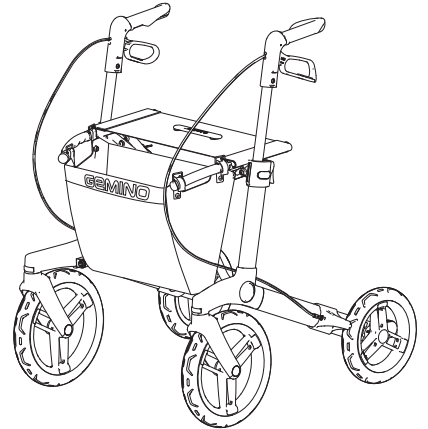

Vask av rammen

Rammen bør regelmessig vaskes med mildt såpevann. Dersom rammen er veldig skitten kan avfettingsmiddel brukes. Rammen kan eventuelt spyles med høytrykksspyler. Forsøk da å unngå direkte spyling mot kulelagre. Tørk rullatoren godt etter vasking eller når den har vært kjørt ute i regnvær. Hvis avfettingsmiddel er brukt bør bevegelige deler smøres opp igjen.

Rengjøring av bremseser

Rengjør jevnlig bremsekloss og bremsefjær. Benytt varmt såpevann og klut/børste.

Rengjøring av kurven

Kurven kan tas av og rengjøres separat.
Maskinvask 40°, håndvask 40° eller desinfeksjon.

Desinfeksjon

Desinfeksjon skal kun utføres av kvalifisert personale. Rullatoren kan desinfiseres med desinfeksjonsmiddel som inneholder 70-80% etanol (alkohol). Ikke benytt klor- og fenolholdige desinfeksjonsmidler.
Ved desinfeksjon, benytt godkjent kjemisk desinfeksjonsmiddel, ikke varmedesinfeksjon (www.legemiddelverket.no).

Gemino 60
Gemino 60 M