

MONTERINGSANVISNING

GEMINO 20




Når du mottar Gemini er den sammenfoldet. Det eneste du trenger å gjøre er å folde den ut og stille inn riktig høyde på kjørehåndtakene, og eventuelt sette på tilbehør.

Gemino 20
Gemino 20 M
Gemino 20 S

Folde ut rullatoren

1. Dra kjørehåndtakene fra hverandre.
2. Press sidestagene ned til du merker et lite klikk i helt utfoldet posisjon.
3. Forsikre deg om at rullatoren er i låst posisjon før du benytter den.

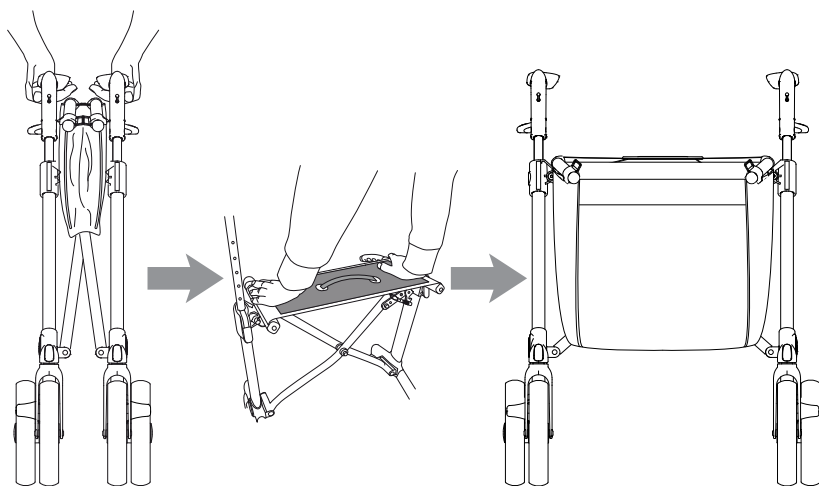

Rullatoren låser automatisk i helt utslått posisjon.

Før Gemini tas i bruk



Monter eventuelt tilbehør i henhold til monteringsanvisningen som følger tilbehøret.



Les brukermanualen før du tar i bruk rullatoren.