

ETTERSYNSRUTINER

GEMINO 30 Parkinson



Gemino 30 Parkinson
Gemino 30 M Parkinson

Serienummer:

Hj.m.nr:

Individ nr:

Dato:

Signatur:

1 Ettersyn	Ja	Nei	2 Tiltak hvis Nei
Bremser			
Er bremsene skadefri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bytt bremsene.
Er bremsevaierne skadefri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bytt bremsevaierne.
Fungerer bremsene korrekt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juster bremsene.
Fungerer bremsene likt på begge sider?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juster bremsene.
Står bremsehendlene i riktig posisjon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juster bremsehendelens posisjon.
Er bremseklossene rene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rengjør bremseklossene.
Er bremsefjærene rene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rengjør bremsefjærene.
Hjul/hjuloppheng			
Er hjulene hele og skadefrie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skift skadede eller slitte hjul.
Kontroller hjuloppheng. Er hjulbolter og gafler uten defekter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bytt defekte hjulbolter/gafler.
Bevegelige deler			
Fungerer alle bevegelige deler?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Korriger i henhold til hva som ikke fungerer. Skift eventuelle defekte deler.
Laserlys			
Fungerer laserlyset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bytt batteriene.
Skrudde forbindelser			
Er alle skrudde forbindelser riktig tilskrudd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etterjuster skrudde forbindelser.
Renhold			
Er rullestolen hygienisk ren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vask eller desinfiser rullatoren.
Kommentarer			