

# ETTERSYNSRUTINER

## GEMINO 30 S



**Gemino 30 S**

Serienummer: .....

Hj.m.nr: .....

Individ nr: .....

Dato: .....

Signatur: .....

| 1 Ettersyn                                                     | Ja                       | Nei                      | 2 Tiltak hvis Nei                                                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bremser</b>                                                 |                          |                          |                                                                               |
| Er bremsene skadefri?                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bytt bremsene.                                                                |
| Er bremsevaierne skadefri?                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bytt bremsevaierne.                                                           |
| Fungerer bremsene korrekt?                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Juster bremsene.                                                              |
| Fungerer bremsene likt på begge sider?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Juster bremsene.                                                              |
| Står bremsehendlene i riktig posisjon?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Juster bremsehendelens posisjon.                                              |
| Er bremseklossene rene?                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rengjør bremseklossene.                                                       |
| Er bremsefjærene rene?                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rengjør bremsefjærene.                                                        |
| <b>Hjul/hjuloppheng</b>                                        |                          |                          |                                                                               |
| Er hjulene hele og skadefrie?                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Skift skadede eller slitte hjul.                                              |
| Kontroller hjuloppheng. Er hjulbolter og gafler uten defekter? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bytt defekte hjulbolter/gafler.                                               |
| <b>Bevegelige deler</b>                                        |                          |                          |                                                                               |
| Fungerer alle bevegelige deler?                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Korriger i henhold til hva som ikke fungerer. Skift eventuelle defekte deler. |
| <b>Skrudde forbindelser</b>                                    |                          |                          |                                                                               |
| Er alle skrudde forbindelser riktig tilskrudd?                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Etterjuster skrudde forbindelser.                                             |
| <b>Renhold</b>                                                 |                          |                          |                                                                               |
| Er rullestolen hygienisk ren?                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vask eller desinfiser rullatoren.                                             |
| <b>Kommentarer</b>                                             |                          |                          |                                                                               |