


ETTERSYNSRUTINER

GEMINO 60

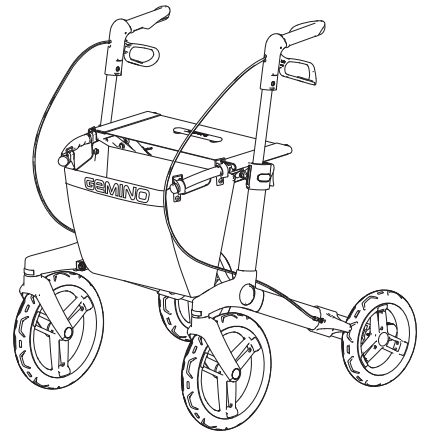

Gemino 60
Gemino 60 M

Serienummer:

Hj.m.nr:

Individ nr:

Dato:

Signatur:

1 Ettersyn	Ja	Nei	2 Tiltak hvis Nei
Bremser			
Er bremsene skadefri?	☐	☐	Bytt bremsene.
Er bremsevaierne skadefri?	☐	☐	Bytt bremsevaierne.
Fungerer bremsene korrekt?	☐	☐	Juster bremsene.
Fungerer bremsene likt på begge sider?	☐	☐	Juster bremsene.
Står bremsehendlene i riktig posisjon?	☐	☐	Juster bremsehendelens posisjon.
Er bremseklossene rene?	☐	☐	Rengjør bremseklossene.
Er bremsefjærene rene?	☐	☐	Rengjør bremsefjærene.
Hjul/hjuloppheng			
Er hjulene hele og skadefrie?	☐	☐	Skift skadede eller slitte hjul.
Kontroller hjuloppheng. Er hjulbolter og gafler uten defekter?	☐	☐	Bytt defekte hjulbolter/gafler.
Bevegelige deler			
Fungerer alle bevegelige deler?	☐	☐	Korriger i henhold til hva som ikke fungerer. Skift eventuelle defekte deler.
Skrudde forbindelser			
Er alle skrudde forbindelser riktig tilskrudd?	☐	☐	Etterjuster skrudde forbindelser.
Renhold			
Er rullestolen hygienisk ren?	☐	☐	Vask eller desinfiser rullatoren.
Kommentarer			