


REAL 9000 PLUS er et medisinsk-teknisk produkt i klasse 1.

REAL-stolen i henhold til de spesifiserte modellbetegnelsene angitt nedenfor er CE-merket i henhold til det svenske legemiddelverkets bestemmelser om medisinsk-tekniske produkter LVFS 2003:11. REAL 9000 Plus oppfyller samtlige krav i henhold til SS-EN 1335, IEC 60601 og SS-EN 12182. Alle tekstiler oppfyller kravene i henhold til EN 1021-1, EN 1021-2. Mercado Medic er sertifisert mot både ISO 9000, 14000 og RoHS2-direktivet, og følger gjeldende arbeids- og miljølover. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne veiledningen og innholdet i den.

Hvis du har spørsmål om produktet, eller hvis det inntreffer noe uforutsett, må du i første omgang kontakte foreskrivderen din. Ellers er du også velkommen til å kontakte Mercado Medic AB. Se siste side for kontaktopplysninger.

Du finner monteringsanvisninger for alt tilbehør på [www.mercado.se/sv/monteringsanvisningar-9000plus](http://www.mercado.se/sv/monteringsanvisningar-9000plus)

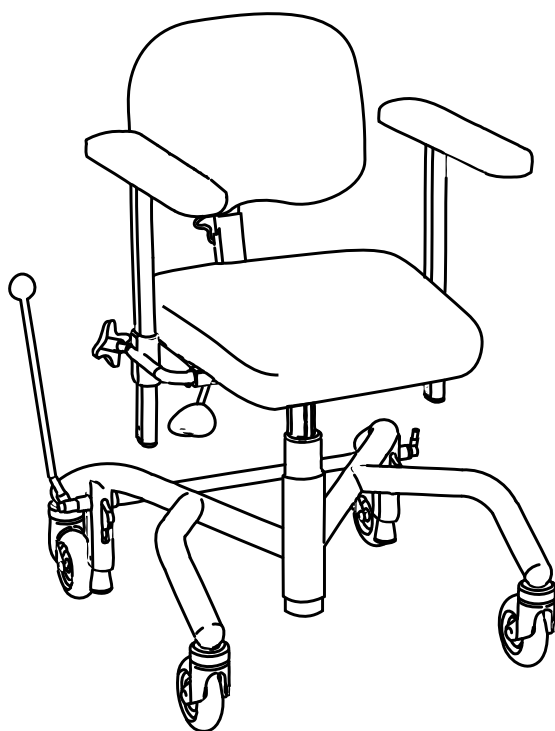

REAL 9000 PLUS MANUELL VOKSEN

REAL 9100 PLUS EL VOKSEN

REAL 9300 PLUS MANUELL BARN

REAL 9400 PLUS EL BARN

REAL 9700 PLUS MANUELL COXIT

REAL 9800 PLUS EL COXIT

## INNHold

Servicemanual

Overhalings-/vedlikeholdsanvisning


Setesystem

Tilbehør


Monteringsanvisninger

**DEMONTERING AV LENKEHJUL**


Løsne sekskantskruen (1) med en 18 mm fastnøkkel. Nå er lenkehjulet løst og kan byttes. Før det nye lenkehjulet monteres, må du påføre Loctite 243 på skruen. Monter hjulet og trekk til skruen.

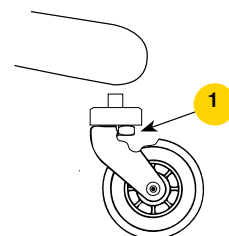**DEMONTERING AV AKTUATOR**


Demonter først setet og løsne deretter de fire unbrakoskruene (2) som holder sittekrysset sammen med aktuatoren. Montering skjer i omvendt rekkefølge.

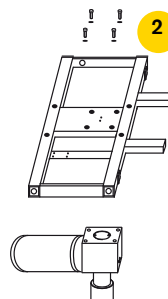**BYTTE AV RYGGPLATE**

Skrut ut skruene på baksiden av ryggplaten med Mercado-nøkkelen (5 mm unbrako). 3 skruer på høy ryggplate, 2 skruer på lav ryggplate. Monter deretter den nye ryggplaten og stram skruene igjen.

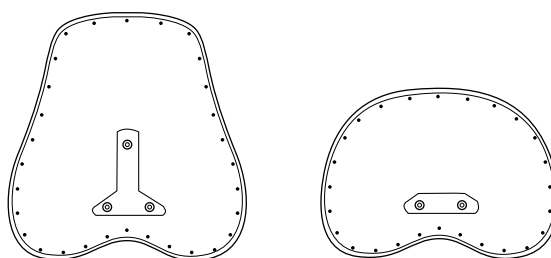**BYTTE AV SITTEPLATE**


Demonter sitteplaten fra sittekrysset ved å skru ut skruene som sitter i rammen på sittekrysset. Vinkeljusterbart sittekryss har seks skruer. Vinkelfast sittekryss har fire skruer. Demonter deretter aktuatoren fra stativet iht. "Demontering av aktuator". Monter deretter det nye setet i omvendt rekkefølge.

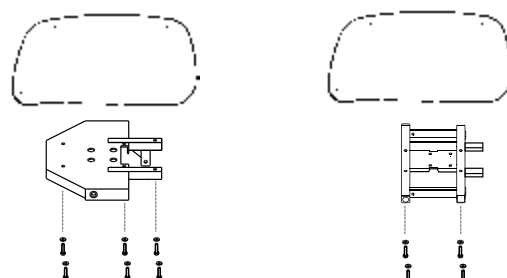**BARNESETE**

Barneseter har mindre sittekryss og demonteres/monteres på samme måte som sittekryss for voksne.

**BYTTE AV ARMLENE**

Skrut ut skruene på undersiden av armleneplaten med Mercado-nøkkelen (5 mm unbrako). Monter deretter den nye armleneplaten og stram skruene.

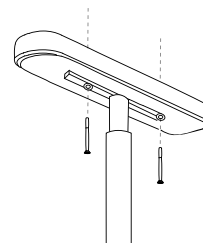**BYTTE AV BATTERI**

Batteriet må byttes av en kvalifisert tekniker.

Instruksjoner er å finne på:

[http://mercado.se/sites/files/pdf/swe/1/Servicemanual\\_batteribyte\\_24V.pdf](http://mercado.se/sites/files/pdf/swe/1/Servicemanual_batteribyte_24V.pdf)


[illegible]

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Stolen bør tørkes av og holdes ren for støv og smuss.
- Stolen må vaskes av med et av Legemiddelsverkets godkjente desinfiseringsmidler, med unntak av de polstrede delene.
- Plysjtrekk vaskes med skumvask:
  1. Fjern løst smuss, smuler og lignende.
  2. Påfør et tynt lag med skum og gni skummet jevnt inn med en fuktig klut.
  3. Ettertørk med en ren og lett fuktet klut.
  4. Støvsug godt når alt har tørket.
- Kunstskinn vaskes med såpevann eller tørkes av med en spritløsning, f.eks. desinfiseringsmiddel.
- Skinntrekk krever litt ekstra vedlikehold:
  - Søl tørkes straks av med en fuktig klut. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler.
  - Unngå at trekket kommer i kontakt med kroppspleieprodukter som sminke, hårgelé m.m.
  - Ikke la husdyr være på skinnmøbler, da klørne kan ripe opp skinnet.
  - Unngå direkte og langvarig sollys, da det på sikt kan bleke skinnet.
- Sete, ryggstøtte og andre polstrede detaljer er av funksjonelle årsaker ikke produsert av sluttet materiale. Ved overhaling bør stoppede detaljer byttes ut av hygieniske årsaker.
- Den elektriske liftomaten må kontrolleres regelmessig med tanke på støv, smuss og stabilitet: Sett sitteplaten i høyeste stilling. Vask med en klut. Vann eller løsemidler må ikke brukes. Smør deretter sylindren inn med et tynt lag med teflon- eller silikonbasert smørefett.
- Brukeren / brukerens assistent må tørke støv av, vaske og rengjøre de polstrede detaljene iht. ovenstående instruksjoner på sin egen stol etter beste evne og behov. Hvis dette ikke utføres tilfredsstillende, kreves det overhaling for å sikre hygienisk trygghet.

**ErgoMedic®**

**POLSTREDE DETALJER FOR REAL 9000, 9000 PLUS, 6100, 6100 PLUS**

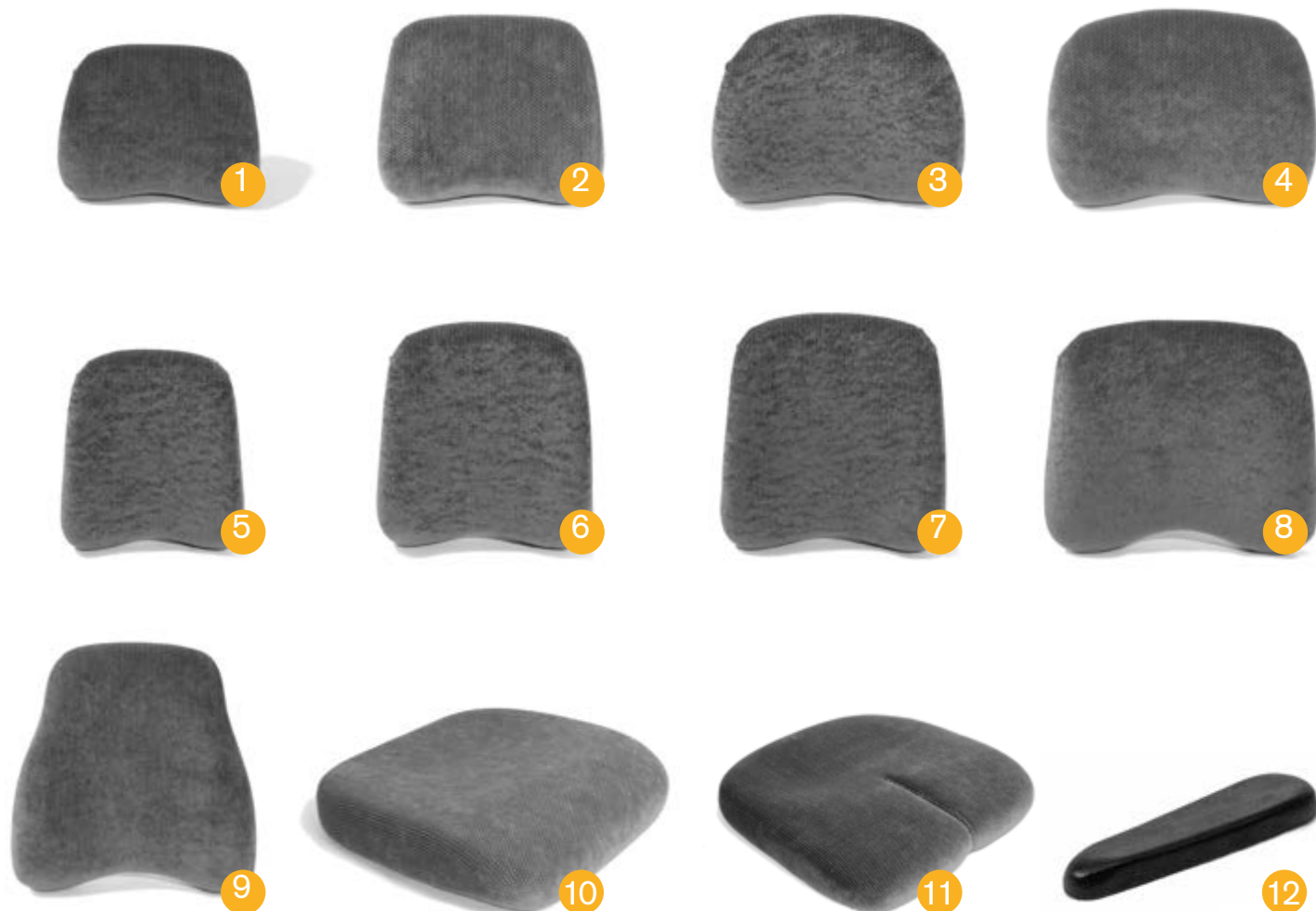

#### Rygg ErgoMedic, bredde x høyde

|   |                                | Art.nr.  |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | Rygg, lav ErgoMedic 27 x 22 cm | BR107046 |
|   | Rygg, lav ErgoMedic 23 x 27 cm | BR105046 |
|   | Rygg, lav ErgoMedic 23 x 20 cm | BR108546 |
| 2 | Rygg, lav ErgoMedic 30 x 26 cm | BR106546 |
| 3 | Rygg, lav ErgoMedic 33 x 26 cm | BR106046 |
| 4 | Rygg, lav ErgoMedic 38 x 26 cm | BR105546 |
| 5 | Rygg, høy EM 27 x 32 cm        | BR104546 |
| 6 | Rygg, høy EM 30 x 34 cm        | BR103546 |
| 7 | Rygg, høy EM 33 x 36 cm        | BR102546 |
| 8 | Rygg, høy EM 40 x 34 cm        | BR103046 |
| 9 | Rygg, høy EM 42 x 43 cm        | BR101546 |
|   | Rygg, høy EM 46 x 43 cm        | BR101046 |

#### Sete ErgoMedic, bredde x dybde

|    |                           | Art.nr.   |
|----|---------------------------|-----------|
| 10 | Sete ErgoMedic 29 x 32 cm | ST105546  |
| 10 | Sete ErgoMedic 33 x 35 cm | ST105046  |
| 10 | Sete ErgoMedic 36 x 39 cm | ST104546  |
| 10 | Sete ErgoMedic 36 x 43 cm | ST104046  |
| 10 | Sete ErgoMedic 40 x 39 cm | ST103546  |
| 10 | Sete ErgoMedic 40 x 43 cm | ST103046  |
| 10 | Sete ErgoMedic 40 x 48 cm |           |
|    | cm ST10254610             |           |
|    | Sete ErgoMedic 44 x 43 cm |           |
|    | cm ST10204610             |           |
|    | ErgoMedic 44 x 48 cm      | Sete      |
| 10 | Sete ErgoMedic 48 x 48 cm | ST101546  |
| 10 | Sete ErgoMedic 48 x 53 cm | ST101046  |
| 10 | Sete ErgoMedic 44 x 53 cm | ST101346* |
| 10 | Sete ErgoMedic 48 x 53 cm | ST100846* |

#### Sete ErgoMedic Coxit, bredde x dybde

|    |                                 | Art.nr.  |
|----|---------------------------------|----------|
| 11 | Sete ErgoMedic Coxit 40 x 43 cm | ST133046 |
| 11 | Sete ErgoMedic Coxit 40 x 48 cm | ST132546 |
| 11 | Sete ErgoMedic Coxit 44 x 43 cm | ST132046 |
| 11 | Sete ErgoMedic Coxit 44 x 48 cm | ST131546 |
| 11 | Sete ErgoMedic Coxit 48 x 48 cm | ST131046 |

#### Armlene ErgoMedic

|    |                              |          |
|----|------------------------------|----------|
| 12 | Armleneplate ErgoMedic 25 cm | AR101038 |
| 12 | Armleneplate ErgoMedic 30 cm | AR102038 |
| 12 | Armleneplate ErgoMedic 35 cm | AR103038 |
| 12 | Armleneplate ErgoMedic 40 cm | AR104038 |

#### FORKLARING PÅ OPPBYGNINGEN AV ARTIKKELNUMMERET

Art.nr.: ST101546  
 "Sete ErgoMedic, plysj, grå 44 x 48 cm"

Tall 1-2 = type polstringsartikkel  
 Tall 3-4 = setesystem  
 Tall 5-6 = størrelse  
 Tall 7 = materiale  
 Tall 8 = farge

! Seter og ryggplater finnes også i Slow Recovery-utførelse  
 \* gjelder ikke ST101346 og ST100846.



## **ErgoMedic® PLUS**

**POLSTREDE DETALJER FOR REAL 9000, 9000 PLUS, 6100, 6100 PLUS**





\*8. ErgoMedic Plus Comfort-ryggen er ekstra oppbygd for maksimal komfort.  
Den har en justerbar korsryggstøtte (pumpe) som gir ekstra støtte i korsryggen.

#### Rygg ErgoMedic PLUS, bredde x høyde

|   |                                              |          |
|---|----------------------------------------------|----------|
| 1 | Rygg ErgoMedic Plus 35 x 20 cm               | BR208046 |
| 1 | Rygg ErgoMedic Plus 40 x 20 cm               | BR207546 |
| 2 | Rygg ErgoMedic Plus 30 x 34 cm               | BR203546 |
| 3 | Rygg ErgoMedic Plus 35 x 43 cm               | BR202046 |
| 4 | Rygg ErgoMedic Plus 42 x 43 cm               | BR201546 |
| 4 | Rygg ErgoMedic Plus 46 x 43 cm               | BR201046 |
| 5 | Rygg EM Plus med sidekile 30 x 34 cm         | BR253546 |
| 6 | Rygg EM Plus med sidekile 35 x 43 cm         | BR252046 |
| 6 | Rygg EM Plus med sidekile 42 x 43 cm         | BR251546 |
| 6 | Rygg EM Plus med sidekile 46 x 43 cm         | BR251046 |
| 7 | Rygg EM Plus forsterket sidekile 35 x 43 cm  | BR352046 |
| 7 | Rygg EM Plus forsterket sidekile 42 x 43 cm  | BR351546 |
| 7 | Rygg EM Plus forsterket sidekile 46 x 43 cm  | BR351046 |
| 8 | Rygg EM Plus Comfort 35 x 43 cm              | BR212046 |
| 8 | Rygg EM Plus Comfort 42 x 43 cm              | BR211546 |
| 8 | Rygg EM Plus Comfort 46 x 43 cm              | BR211046 |
| 8 | Rygg EM Plus Comfort med sidekile 35 x 43    | BR262046 |
| 8 | Rygg EM Plus Comfort med sidekile 42 x 43    | BR261546 |
| 8 | Rygg EM Plus Comfort med sidekile 46 x 43    | BR261046 |
| 8 | Rygg EM Plus Comfort med forst. kile 35 x 43 | BR362046 |
| 8 | Rygg EM Plus Comfort med forst. kile 42 x 43 | BR361546 |
| 8 | Rygg EM Plus Comfort med forst. kile 46 x 43 | BR361046 |

#### Sete ErgoMedic PLUS, bredde x dybde

|   |                                |          |
|---|--------------------------------|----------|
| 9 | Sete ErgoMedic Plus 29 x 32 cm | ST205546 |
| 9 | Sete ErgoMedic Plus 33 x 35 cm | ST205046 |
| 9 | Sete ErgoMedic Plus 36 x 39 cm | ST204546 |
| 9 | Sete ErgoMedic Plus 36 x 43 cm | ST204046 |
| 9 | Sete ErgoMedic Plus 40 x 39 cm | ST203546 |

#### Sete ErgoMedic PLUS, bredde x dybde

|   |                                |          |
|---|--------------------------------|----------|
| 9 | Sete ErgoMedic Plus 40 x 43 cm | ST203046 |
| 9 | Sete ErgoMedic Plus 40 x 48 cm | ST202546 |
| 9 | Sete ErgoMedic Plus 44 x 43 cm | ST202046 |
| 9 | Sete ErgoMedic Plus 44 x 48 cm | ST201546 |
| 9 | Sete ErgoMedic Plus 48 x 48 cm | ST201046 |
| 9 | Sete ErgoMedic Plus 44 x 53 cm | ST201346 |
| 9 | Sete ErgoMedic Plus 48 x 53 cm | ST200846 |

#### Sete ErgoMedic Coxit PLUS, bredde x dybde

|    |                                      |          |
|----|--------------------------------------|----------|
| 10 | Sete ErgoMedic Coxit Plus 40 x 39 cm | ST233546 |
| 10 | Sete ErgoMedic Coxit Plus 40 x 43 cm | ST233046 |
| 10 | Sete ErgoMedic Coxit Plus 40 x 48 cm | ST232546 |
| 10 | Sete ErgoMedic Coxit Plus 44 x 43 cm | ST232046 |
| 10 | Sete ErgoMedic Coxit Plus 44 x 48 cm | ST231546 |
| 10 | Sete ErgoMedic Coxit Plus 48 x 48 cm | ST231046 |

#### Nakkestøtte, bredde x høyde

|    |                                    |        |
|----|------------------------------------|--------|
| 11 | Nakkestøttepute EM Plus 30 x 23 cm | NS2046 |
| 12 | Nakkestøttepute EM Plus 30 x 8 cm  | NS4046 |

#### Armlene

|    |                                      |          |
|----|--------------------------------------|----------|
| 13 | Armleneplate ErgoMedic Plus h. 42 cm | AR205138 |
| 13 | Armleneplate ErgoMedic Plus v. 42 cm | AR205238 |
| 13 | Armleneplate ErgoMedic Plus h. 30 cm | AR202138 |
| 13 | Armleneplate ErgoMedic Plus v. 30 cm | AR202238 |

understreket artikkel vises på bildet

! Seter og ryggplater finnes også i  
Slow Recovery-utførelse.



## ØVRIGE POLSTREDE DETALJER





#### Bolstøtte, bredde x høyde

- 1 Bolstøttepute 15 x 13 cm  
2 Bolstøttepute, sving- og justerbar

#### Art.nr.

TS1046  
TS2038

#### Nakkestøtte, bredde x høyde

- 3 Nakkestøttepute, rett 29 x 16 cm  
4 Nakkestøttepute, buet 31 x 18 cm

#### Art.nr.

NS1046  
NS3046

#### Armlene

- 6 Armleneplate Mobil 25 cm  
6 Armleneplate Mobil 30 cm  
6 Armleneplate Mobil 35 cm  
6 Armleneplate Mobil 40 cm  
7 Armleneplate Hemiplegi 45 x 12 cm  
8 Armleneplate ekstra myk 25 cm  
8 Armleneplate ekstra myk 30 cm  
8 Armleneplate ekstra myk 35 cm

#### Art.nr.

AR301038  
AR302038  
AR303038  
AR304038  
AR406038  
AR511038  
AR512038  
AR513038

#### Art.nr. for vinkel

240387  
240386  
240385  
240388  
244387  
245386  
245385  
245388

- 9 Sete, treplate  
10 Sete, treplate med antiskli

ST10xx61

ST10xx90

#### Overtrekk

5 Fås i plysj, mønstret stoff og inkontinensmateriale. Se [www.mercado.se](http://www.mercado.se) eller kontakt Mercado for mer informasjon.

16 Sete ErgoMedic med hygienestoff. Kompletter med overtrekk i plysj.

#### Sidestøtte, bredde x høyde

- 11 Sidestøttepute XS, 15 x 8 cm  
12 Sidestøttepute S, 28 x 8 cm  
13 Sidestøttepute M, 24 x 14 cm  
14 Sidestøttepute L, 30 x 16 cm

#### Art.nr.

SS1046  
SS2046  
SS3046  
SS4046

#### Sete Slow Recovery

##### Størrelse bredde x dybde

- 15 33 x 35 cm  
15 36 x 39 cm  
15 36 x 43 cm  
15 40 x 39 cm  
15 40 x 43 cm  
15 40 x 48 cm  
15 44 x 43 cm  
15 44 x 48 cm  
15 48 x 48 cm

#### Slow Recovery

##### ErgoMedic

ST115046  
ST114546  
ST114046  
ST113546  
ST113046  
ST112546  
ST112046  
ST111546  
ST111046

#### Slow Recovery

##### ErgoMedic Coxit

–  
–  
–  
ST143546  
ST143046  
ST142546  
ST142046  
ST141546  
ST141046

#### Slow Recovery

##### ErgoMedic PLUS

ST215046  
ST214546  
ST214046  
ST213546  
ST213046  
ST212546  
ST212046  
ST211546  
ST211046


#### Slow Recovery

##### ErgoMedic PLUS Coxit


–  
–  
–  
ST243546  
ST243046  
ST242546  
ST242046  
ST241546  
ST241046

# MÅL PÅ RYGGPLATER

ErgoMedic


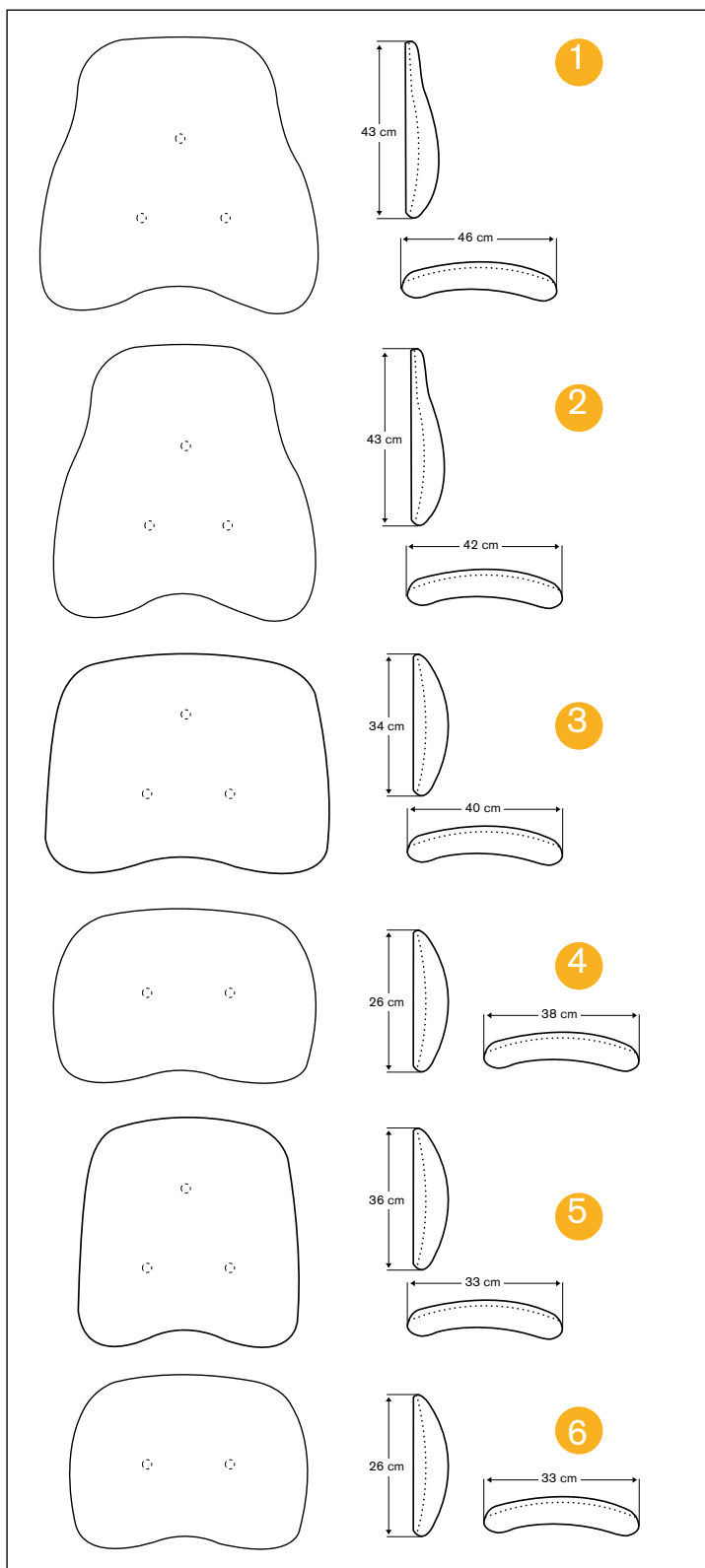


- |   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Størrelse: 46 x 43 cm | Art.nr.: BR101046 |
| 2 | Størrelse: 42 x 43 cm | Art.nr.: BR101546 |
| 3 | Størrelse: 40 x 34 cm | Art.nr.: BR103046 |
| 4 | Størrelse: 38 x 26 cm | Art.nr.: BR105546 |
| 5 | Størrelse: 33 x 36 cm | Art.nr.: BR102546 |
| 6 | Størrelse: 33 x 26 cm | Art.nr.: BR106046 |

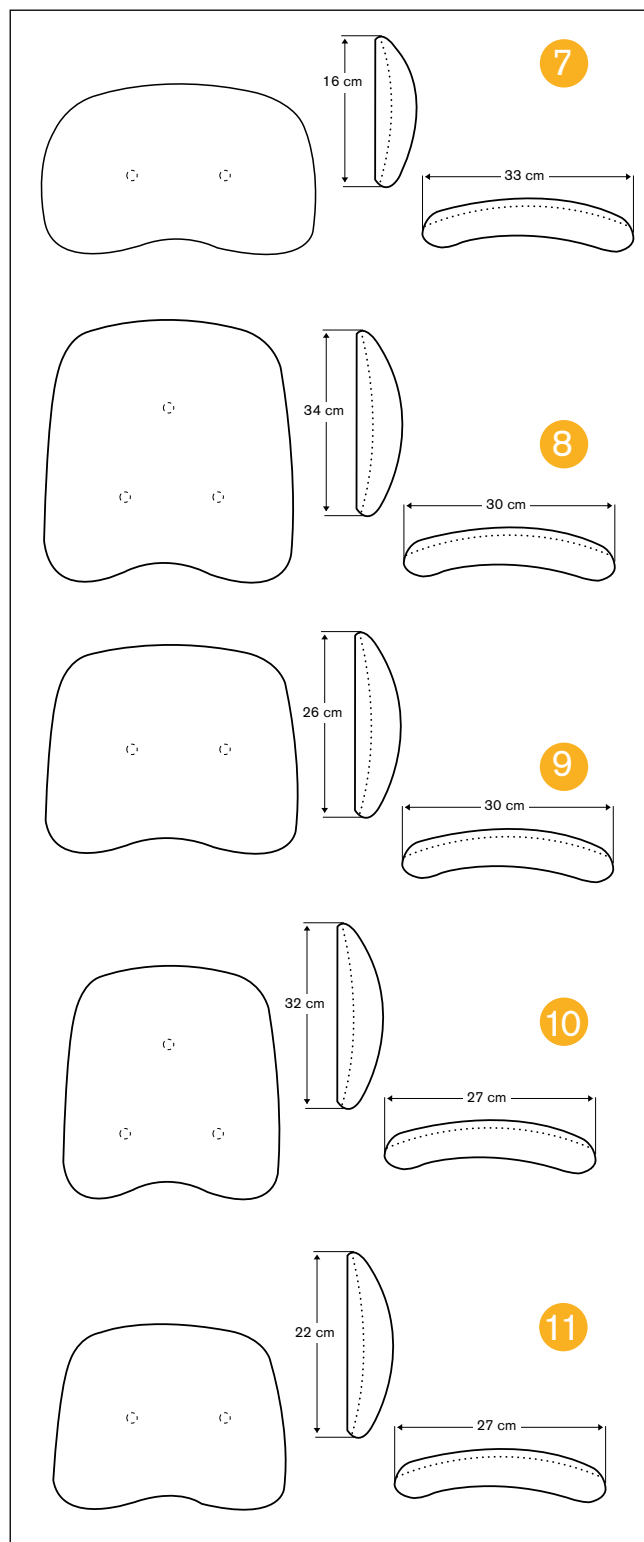

- |    |                       |                   |
|----|-----------------------|-------------------|
| 7  | Størrelse: 33 x 16 cm | Art.nr.: BR109046 |
| 8  | Størrelse: 30 x 34 cm | Art.nr.: BR103546 |
| 9  | Størrelse: 30 x 26 cm | Art.nr.: BR106546 |
| 10 | Størrelse: 27 x 32 cm | Art.nr.: BR104546 |
| 11 | Størrelse: 27 x 22 cm | Art.nr.: BR107046 |
| 12 | Størrelse: 23 x 27 cm | Art.nr.: BR105046 |
| 13 | Størrelse: 23 x 20 cm | Art.nr.: BR108546 |


# ErgoMedic PLUS

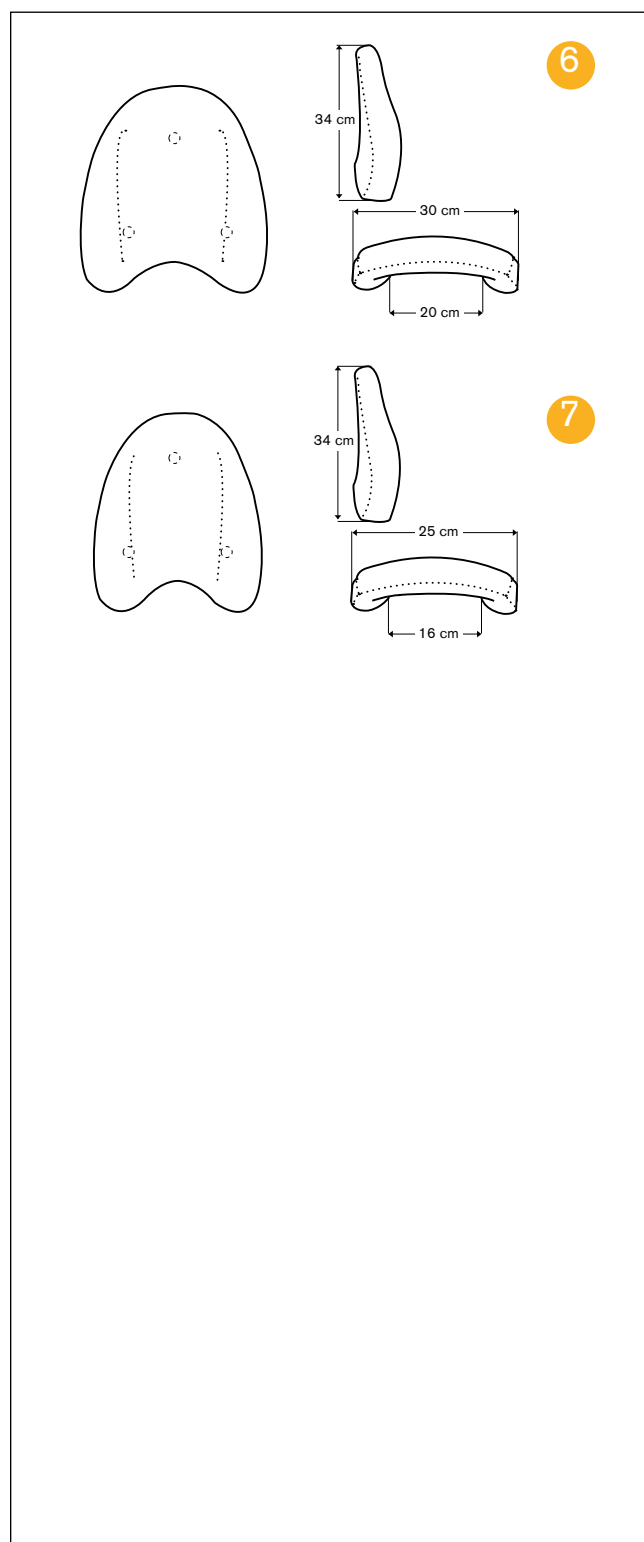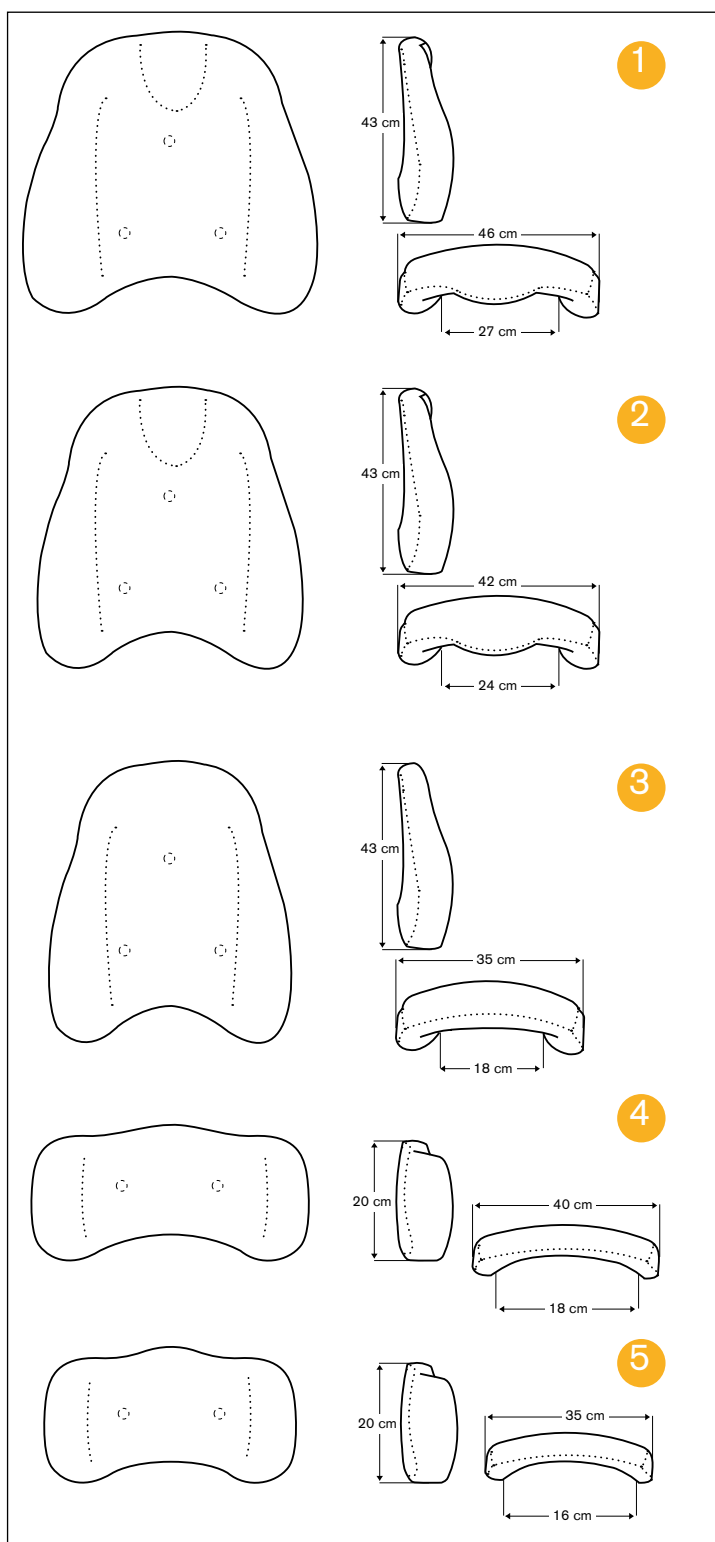

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1 Størrelse: 46 x 43 cm | Art.nr.: BR201046 |
| 2 Størrelse: 42 x 43 cm | Art.nr.: BR201546 |
| 3 Størrelse: 35 x 43 cm | Art.nr.: BR202046 |
| 4 Størrelse: 40 x 20 cm | Art.nr.: BR207546 |
| 5 Størrelse: 35 x 20 cm | Art.nr.: BR208046 |


- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 6 Størrelse: 30 x 34 cm | Art.nr.: BR203546 |
| 7 Størrelse: 25 x 34 cm | Art.nr.: BR204046 |

## ErgoMedic PLUS med sidekile

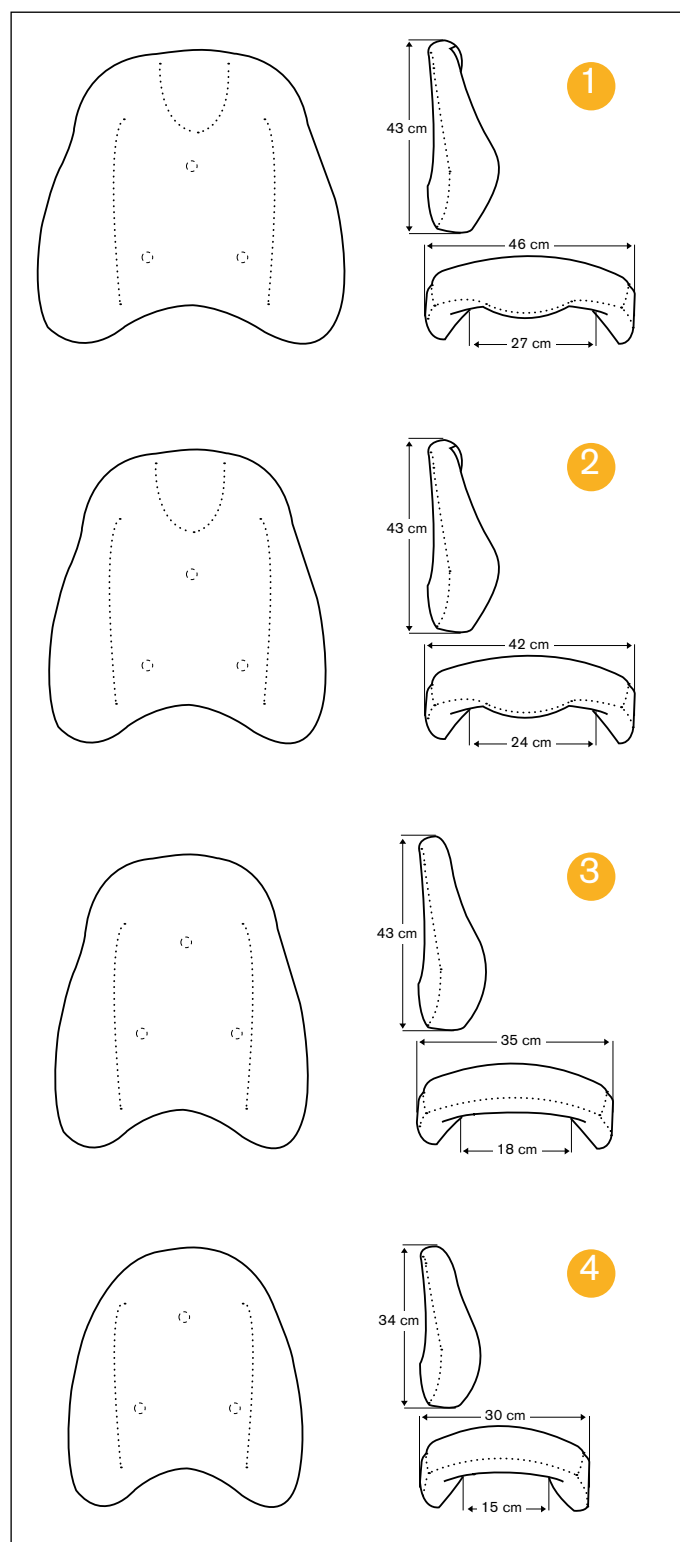


- |   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Størrelse: 46 x 43 cm | Art.nr.: BR251046 |
| 2 | Størrelse: 42 x 43 cm | Art.nr.: BR251546 |
| 3 | Størrelse: 35 x 43 cm | Art.nr.: BR252046 |
| 4 | Størrelse: 30 x 34 cm | Art.nr.: BR253546 |

## ErgoMedic PLUS med forsterket sidekile

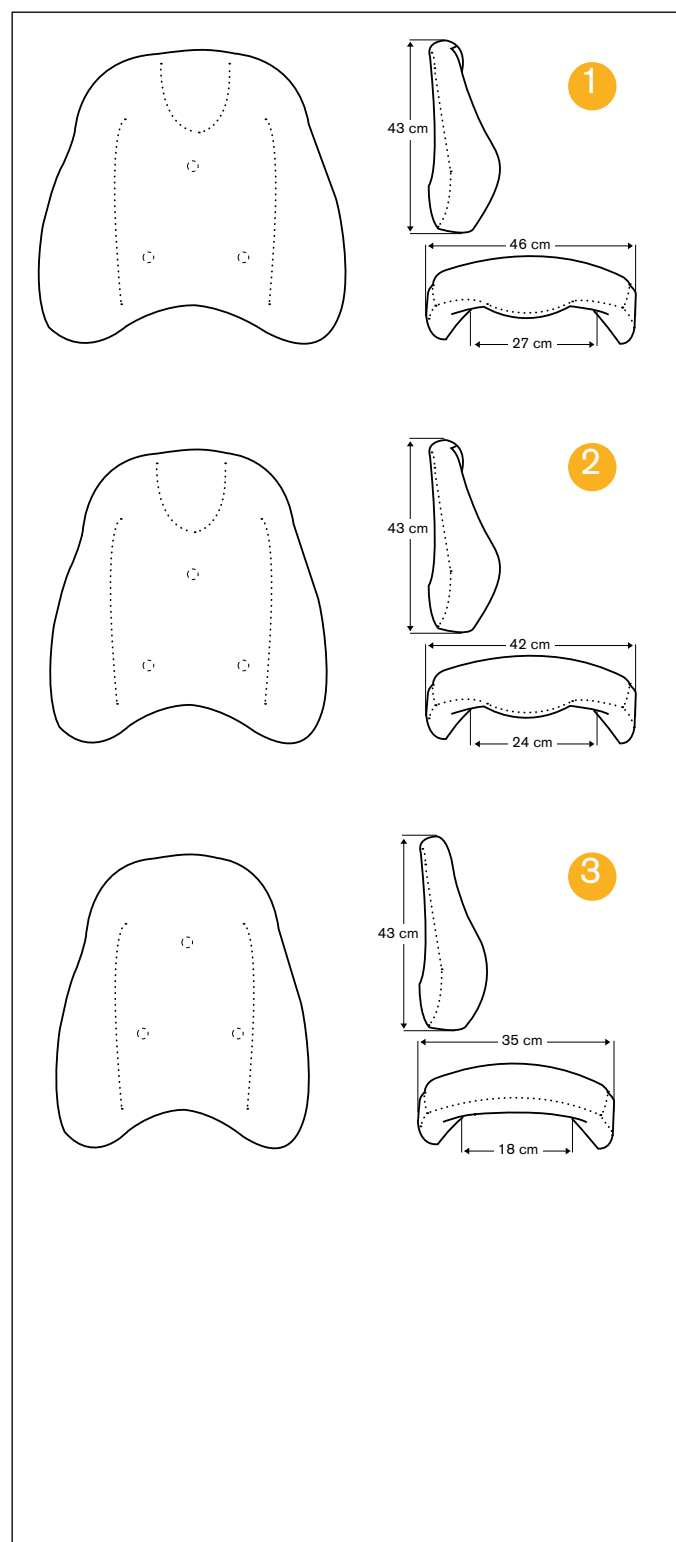


- |   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Størrelse: 46 x 43 cm | Art.nr.: BR351046 |
| 2 | Størrelse: 42 x 43 cm | Art.nr.: BR351546 |
| 3 | Størrelse: 35 x 43 cm | Art.nr.: BR352046 |

ErgoMedic PLUS Comfort

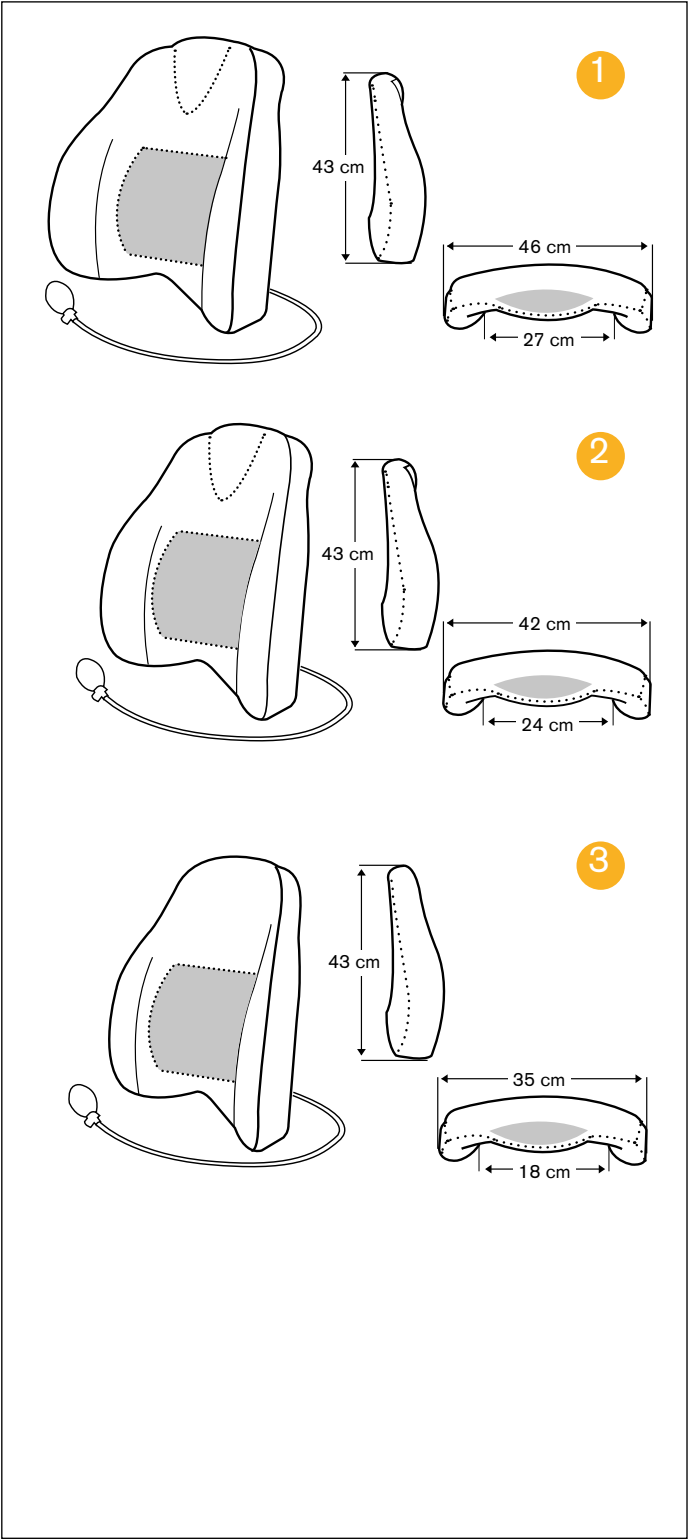

- 1 Størrelse: 46 x 43 cm Art.nr.: BR211046
- 2 Størrelse: 42 x 43 cm Art.nr.: BR211546
- 3 Størrelse: 35 x 43 cm Art.nr.: BR212046



ErgoMedic PLUS Comfort med sidekile

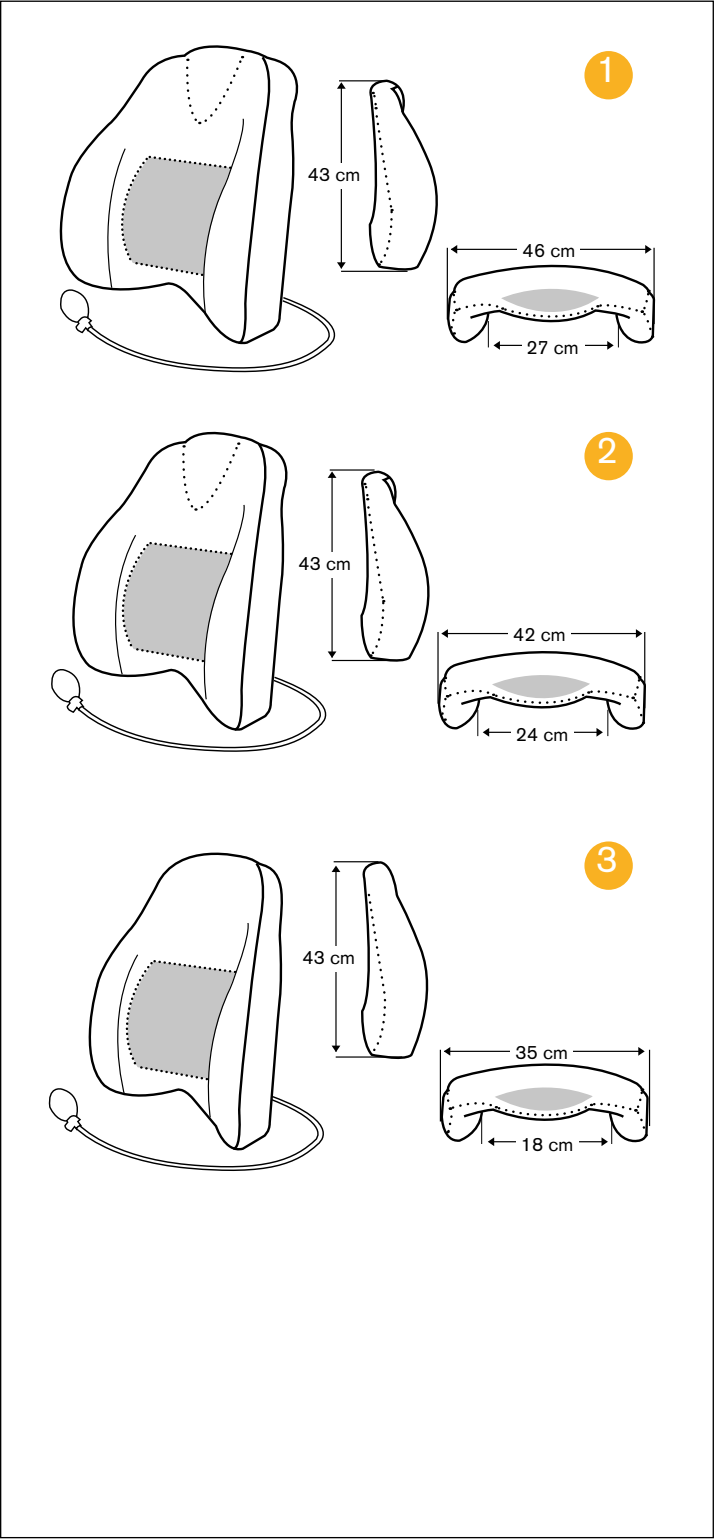

- 1 Størrelse: 46 x 43 cm Art.nr.: BR261046
- 2 Størrelse: 42 x 43 cm Art.nr.: BR261546
- 3 Størrelse: 35 x 43 cm Art.nr.: BR262046

# MÅL PÅ SITTEPLATER

ErgoMedic

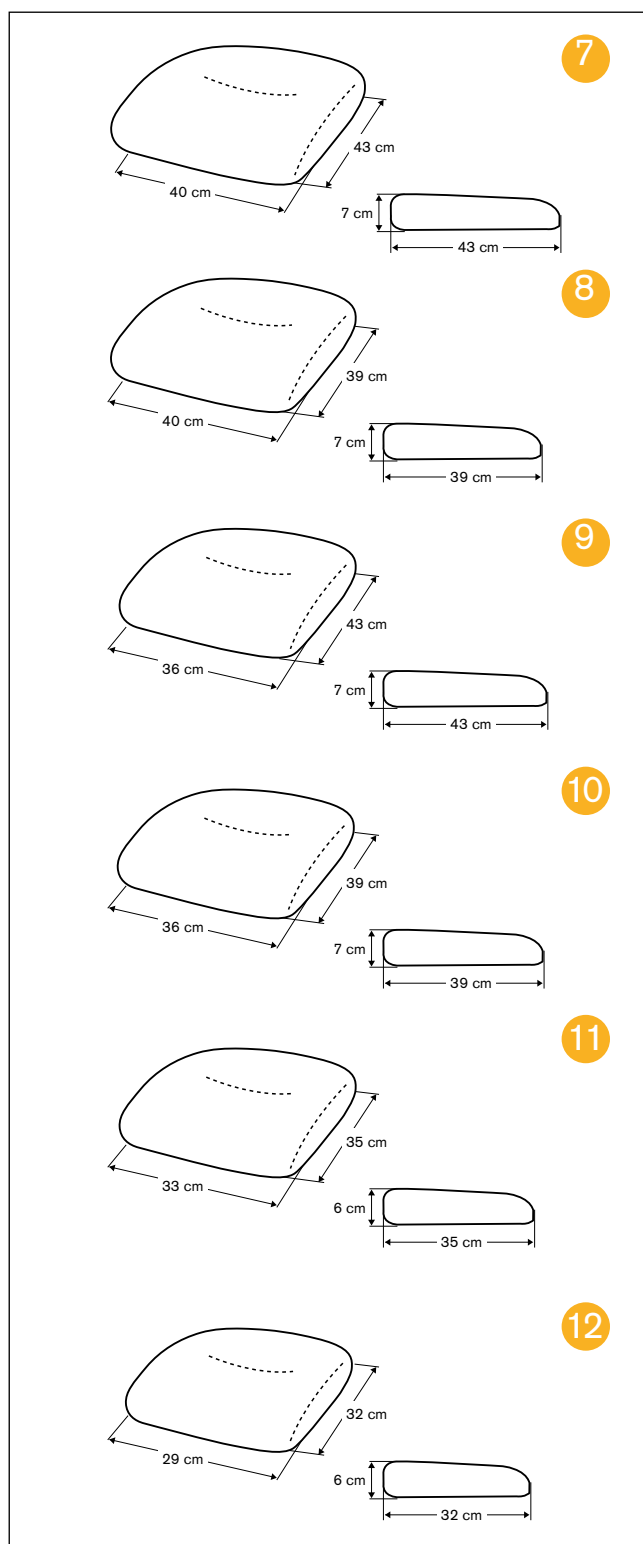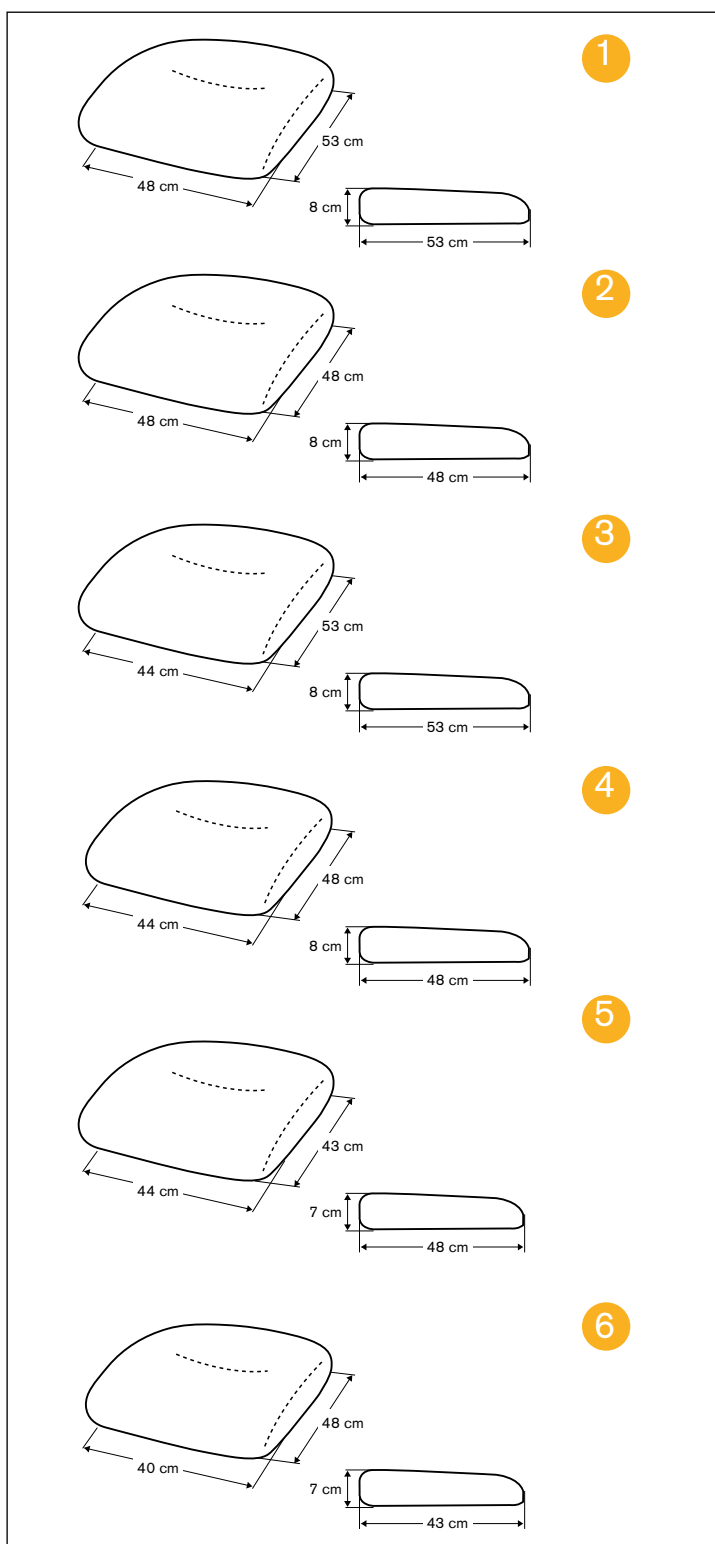


- |   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Størrelse: 48 x 53 cm | Art.nr.: ST100846 |
| 2 | Størrelse: 48 x 48 cm | Art.nr.: ST101046 |
| 3 | Størrelse: 44 x 53 cm | Art.nr.: ST101346 |
| 4 | Størrelse: 44 x 48 cm | Art.nr.: ST101546 |
| 5 | Størrelse: 44 x 43 cm | Art.nr.: ST102046 |
| 6 | Størrelse: 40 x 48 cm | Art.nr.: ST102546 |


- |    |                       |                   |
|----|-----------------------|-------------------|
| 7  | Størrelse: 40 x 43 cm | Art.nr.: ST103046 |
| 8  | Størrelse: 40 x 39 cm | Art.nr.: ST103546 |
| 9  | Størrelse: 36 x 43 cm | Art.nr.: ST104046 |
| 10 | Størrelse: 36 x 39 cm | Art.nr.: ST104546 |
| 11 | Størrelse: 33 x 35 cm | Art.nr.: ST105046 |
| 12 | Størrelse: 29 x 32 cm | Art.nr.: ST105546 |



## ErgoMedic Slow Recovery

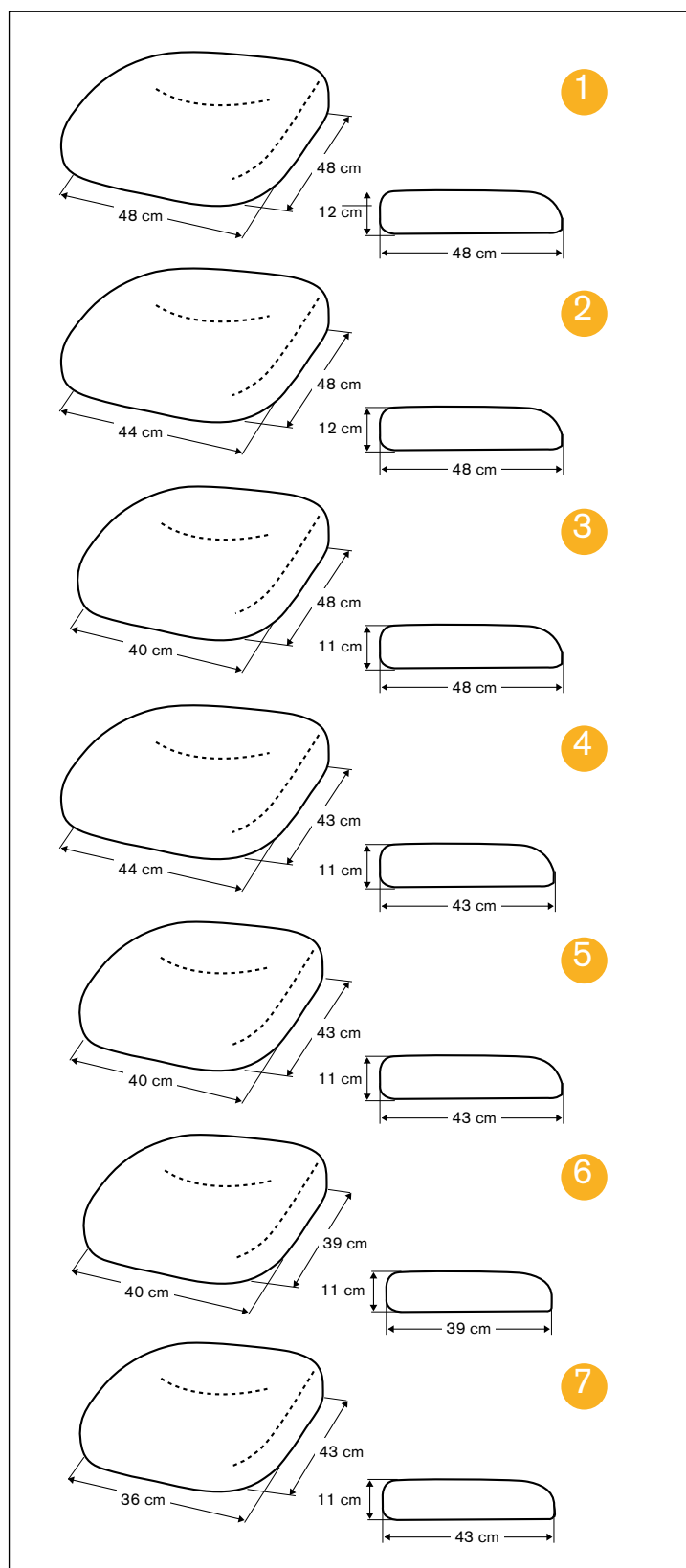


|   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Størrelse: 48 x 48 cm | Art.nr.: ST111046 |
| 2 | Størrelse: 44 x 48 cm | Art.nr.: ST111546 |
| 3 | Størrelse: 44 x 43 cm | Art.nr.: ST112046 |
| 4 | Størrelse: 40 x 48 cm | Art.nr.: ST112546 |
| 5 | Størrelse: 40 x 43 cm | Art.nr.: ST113046 |
| 6 | Størrelse: 40 x 39 cm | Art.nr.: ST113546 |
| 7 | Størrelse: 36 x 43 cm | Art.nr.: ST114046 |

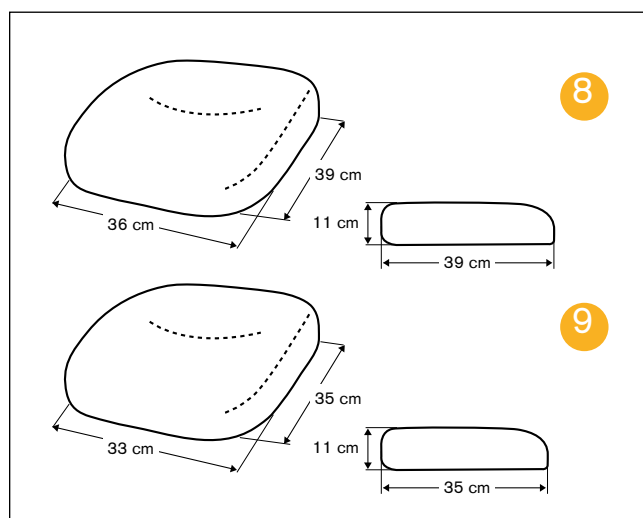


|   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 8 | Størrelse: 36 x 39 cm | Art.nr.: ST114546 |
| 9 | Størrelse: 33 x 35 cm | Art.nr.: ST115046 |

## Treplate

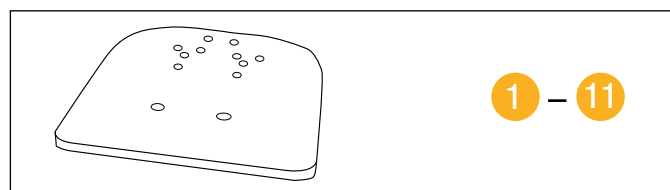


|    |                       |                   |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1  | Størrelse: 48 x 53 cm | Art.nr.: ST100890 |
| 2  | Størrelse: 48 x 48 cm | Art.nr.: ST101090 |
| 3  | Størrelse: 44 x 53 cm | Art.nr.: ST101390 |
| 4  | Størrelse: 44 x 48 cm | Art.nr.: ST101590 |
| 5  | Størrelse: 44 x 43 cm | Art.nr.: ST102090 |
| 6  | Størrelse: 40 x 48 cm | Art.nr.: ST102590 |
| 7  | Størrelse: 40 x 43 cm | Art.nr.: ST103090 |
| 8  | Størrelse: 40 x 39 cm | Art.nr.: ST103590 |
| 9  | Størrelse: 36 x 43 cm | Art.nr.: ST104090 |
| 10 | Størrelse: 36 x 39 cm | Art.nr.: ST104590 |
| 11 | Størrelse: 33 x 35 cm | Art.nr.: ST105090 |

## Treplate med antiskli

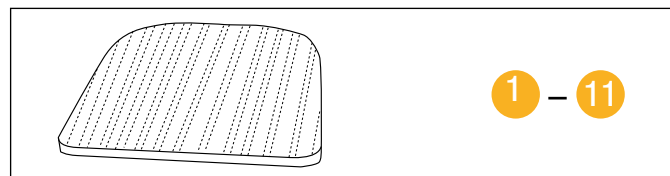


|    |                       |                   |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1  | Størrelse: 48 x 53 cm | Art.nr.: ST100861 |
| 2  | Størrelse: 48 x 48 cm | Art.nr.: ST101061 |
| 3  | Størrelse: 44 x 53 cm | Art.nr.: ST101361 |
| 4  | Størrelse: 44 x 48 cm | Art.nr.: ST101561 |
| 5  | Størrelse: 44 x 43 cm | Art.nr.: ST102061 |
| 6  | Størrelse: 40 x 48 cm | Art.nr.: ST102561 |
| 7  | Størrelse: 40 x 43 cm | Art.nr.: ST103061 |
| 8  | Størrelse: 40 x 39 cm | Art.nr.: ST103561 |
| 9  | Størrelse: 36 x 43 cm | Art.nr.: ST104061 |
| 10 | Størrelse: 36 x 39 cm | Art.nr.: ST104561 |
| 11 | Størrelse: 33 x 35 cm | Art.nr.: ST105061 |

## ErgoMedic Coxit

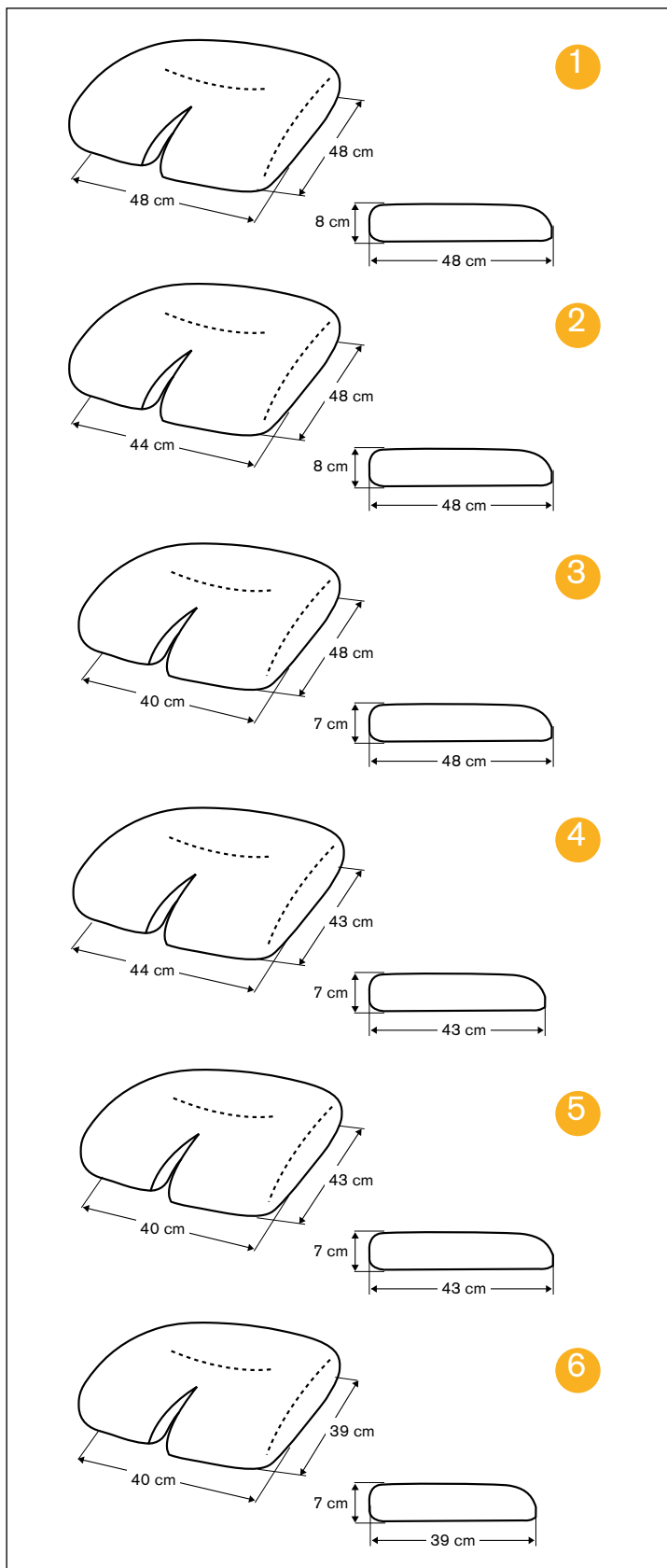



- |   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Størrelse: 48 x 48 cm | Art.nr.: ST131046 |
| 2 | Størrelse: 44 x 48 cm | Art.nr.: ST131546 |
| 3 | Størrelse: 44 x 43 cm | Art.nr.: ST132046 |
| 4 | Størrelse: 40 x 48 cm | Art.nr.: ST132546 |
| 5 | Størrelse: 40 x 43 cm | Art.nr.: ST133046 |
| 6 | Størrelse: 40 x 39 cm | Art.nr.: ST133546 |

## ErgoMedic Coxit Slow Recovery

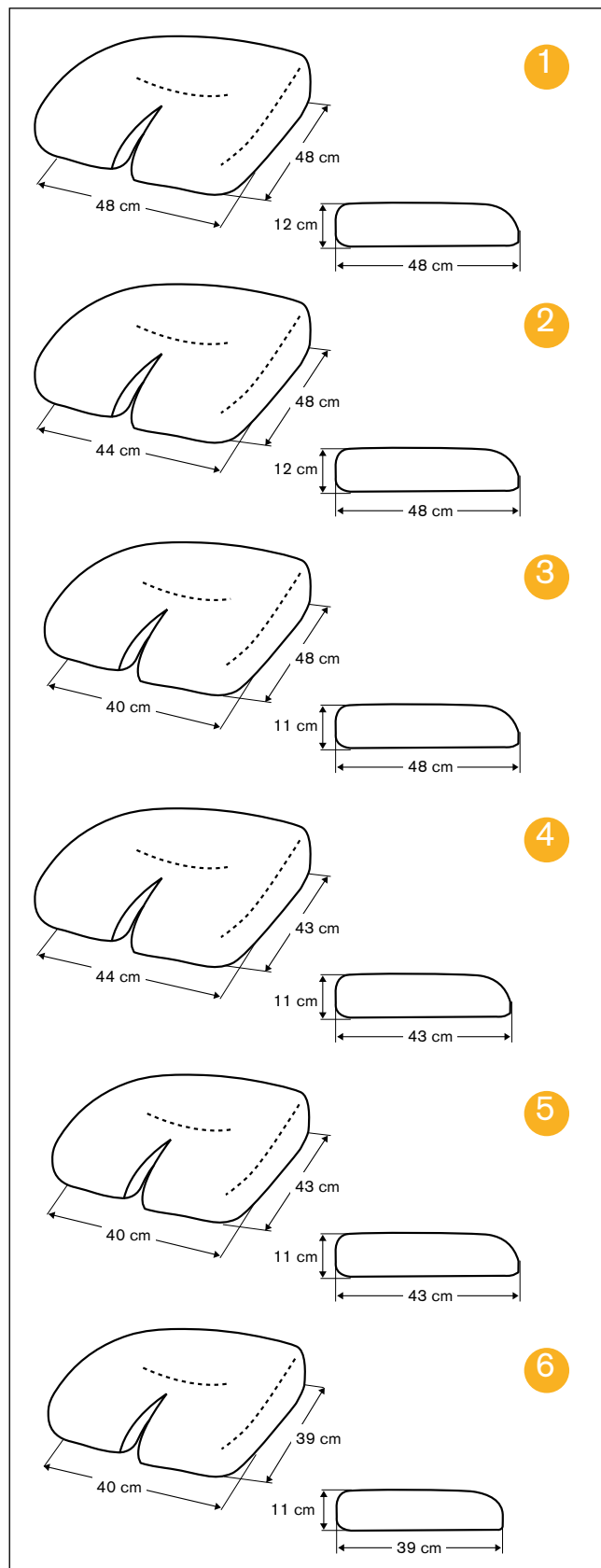

- |   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Størrelse: 48 x 48 cm | Art.nr.: ST141046 |
| 2 | Størrelse: 44 x 48 cm | Art.nr.: ST141546 |
| 3 | Størrelse: 44 x 43 cm | Art.nr.: ST142046 |
| 4 | Størrelse: 40 x 48 cm | Art.nr.: ST142546 |
| 5 | Størrelse: 40 x 43 cm | Art.nr.: ST143046 |
| 6 | Størrelse: 40 x 39 cm | Art.nr.: ST143546 |


# ErgoMedic PLUS

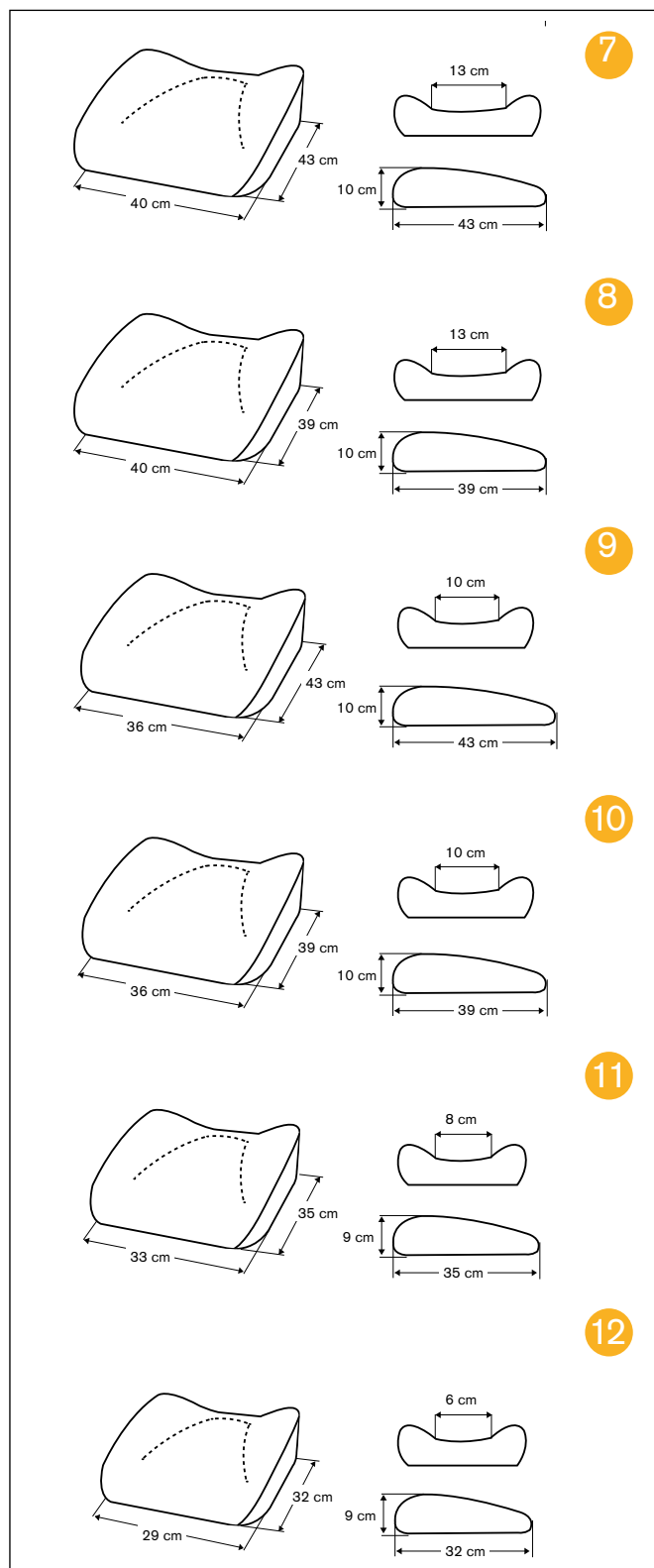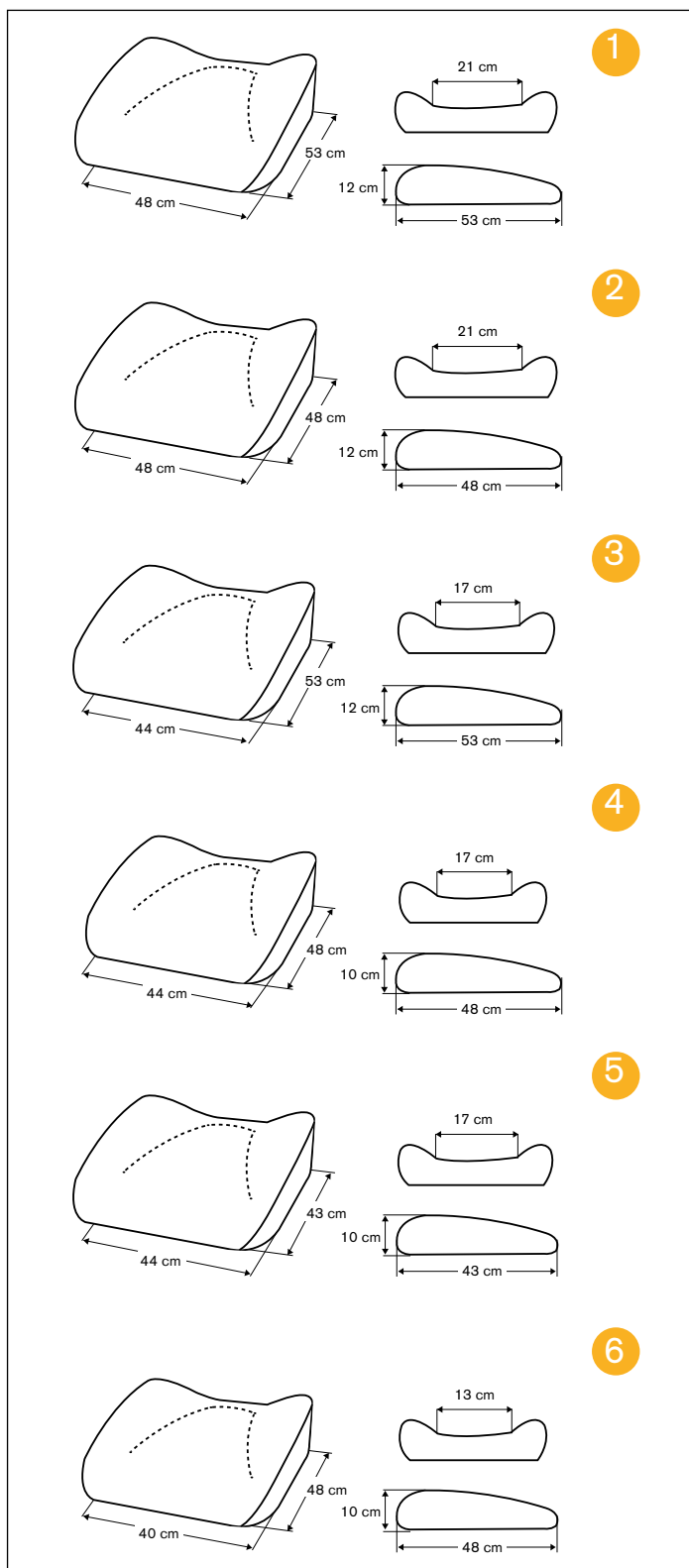


- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1 Størrelse: 48 x 53 cm | Art.nr.: ST200846 |
| 2 Størrelse: 48 x 48 cm | Art.nr.: ST201046 |
| 3 Størrelse: 44 x 53 cm | Art.nr.: ST201346 |
| 4 Størrelse: 44 x 48 cm | Art.nr.: ST201546 |
| 5 Størrelse: 44 x 43 cm | Art.nr.: ST202046 |
| 6 Størrelse: 40 x 48 cm | Art.nr.: ST202546 |

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 7 Størrelse: 40 x 43 cm  | Art.nr.: ST203046 |
| 8 Størrelse: 40 x 39 cm  | Art.nr.: ST203546 |
| 9 Størrelse: 36 x 43 cm  | Art.nr.: ST204046 |
| 10 Størrelse: 36 x 39 cm | Art.nr.: ST204546 |
| 11 Størrelse: 33 x 35 cm | Art.nr.: ST205046 |
| 12 Størrelse: 29 x 32 cm | Art.nr.: ST205546 |


## ErgoMedic PLUS Slow Recovery

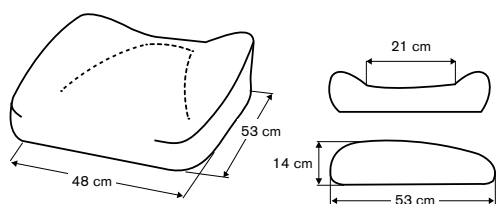


1

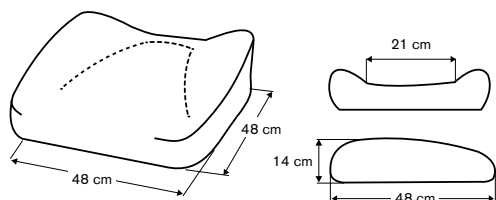


2

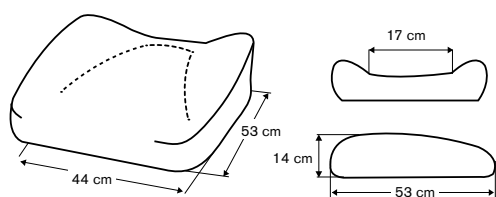


3

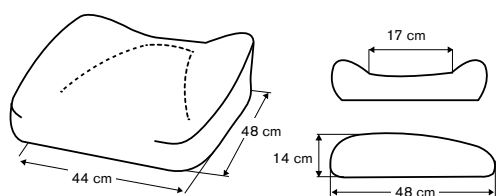


4

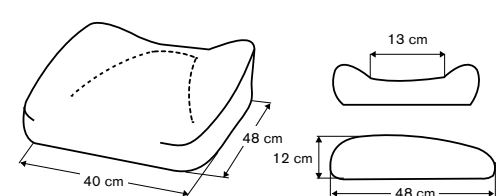


5

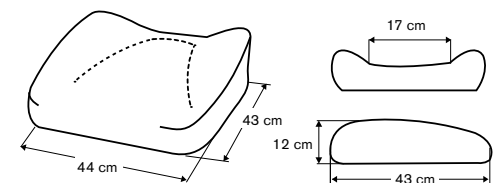


6

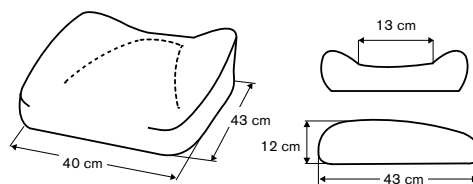


7

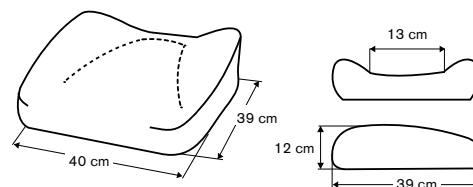


8

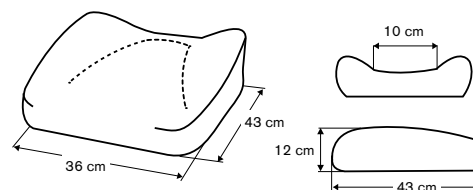

9

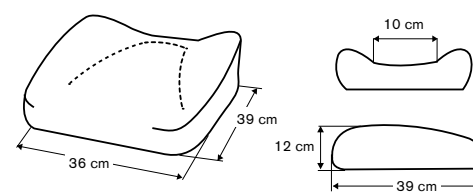

10

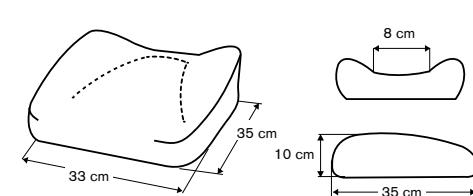


11

- |   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Størrelse: 48 x 53 cm | Art.nr.: ST210846 |
| 2 | Størrelse: 48 x 48 cm | Art.nr.: ST211046 |
| 3 | Størrelse: 44 x 53 cm | Art.nr.: ST211346 |
| 4 | Størrelse: 44 x 48 cm | Art.nr.: ST211546 |
| 5 | Størrelse: 44 x 43 cm | Art.nr.: ST212046 |
| 6 | Størrelse: 40 x 48 cm | Art.nr.: ST212546 |


- |    |                       |                   |
|----|-----------------------|-------------------|
| 7  | Størrelse: 40 x 43 cm | Art.nr.: ST213046 |
| 8  | Størrelse: 40 x 39 cm | Art.nr.: ST213546 |
| 9  | Størrelse: 36 x 43 cm | Art.nr.: ST214046 |
| 10 | Størrelse: 36 x 39 cm | Art.nr.: ST214546 |
| 11 | Størrelse: 33 x 35 cm | Art.nr.: ST215046 |

## ErgoMedic PLUS Coxit

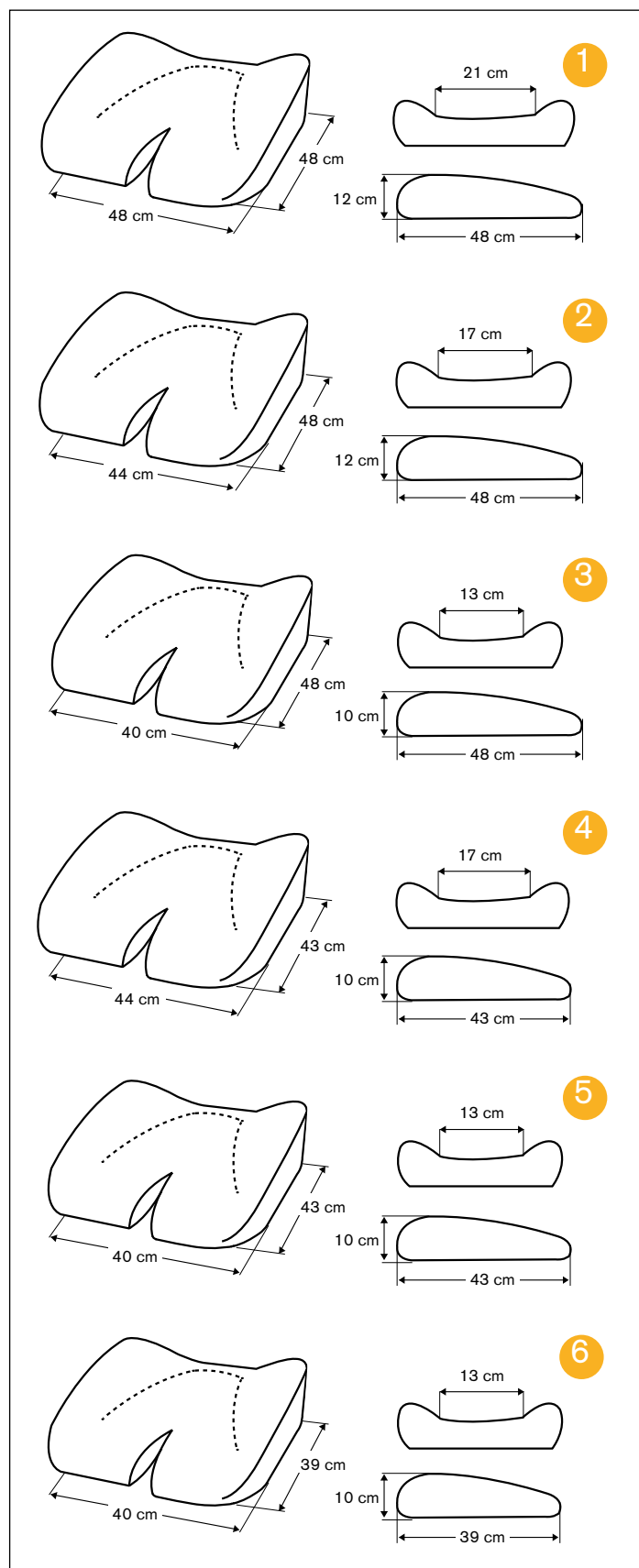

- |   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Størrelse: 48 x 48 cm | Art.nr.: ST231046 |
| 2 | Størrelse: 44 x 48 cm | Art.nr.: ST231546 |
| 3 | Størrelse: 44 x 43 cm | Art.nr.: ST232046 |
| 4 | Størrelse: 40 x 48 cm | Art.nr.: ST232546 |
| 5 | Størrelse: 40 x 43 cm | Art.nr.: ST233046 |
| 6 | Størrelse: 40 x 39 cm | Art.nr.: ST233546 |

## ErgoMedic PLUS Coxit Slow Recovery

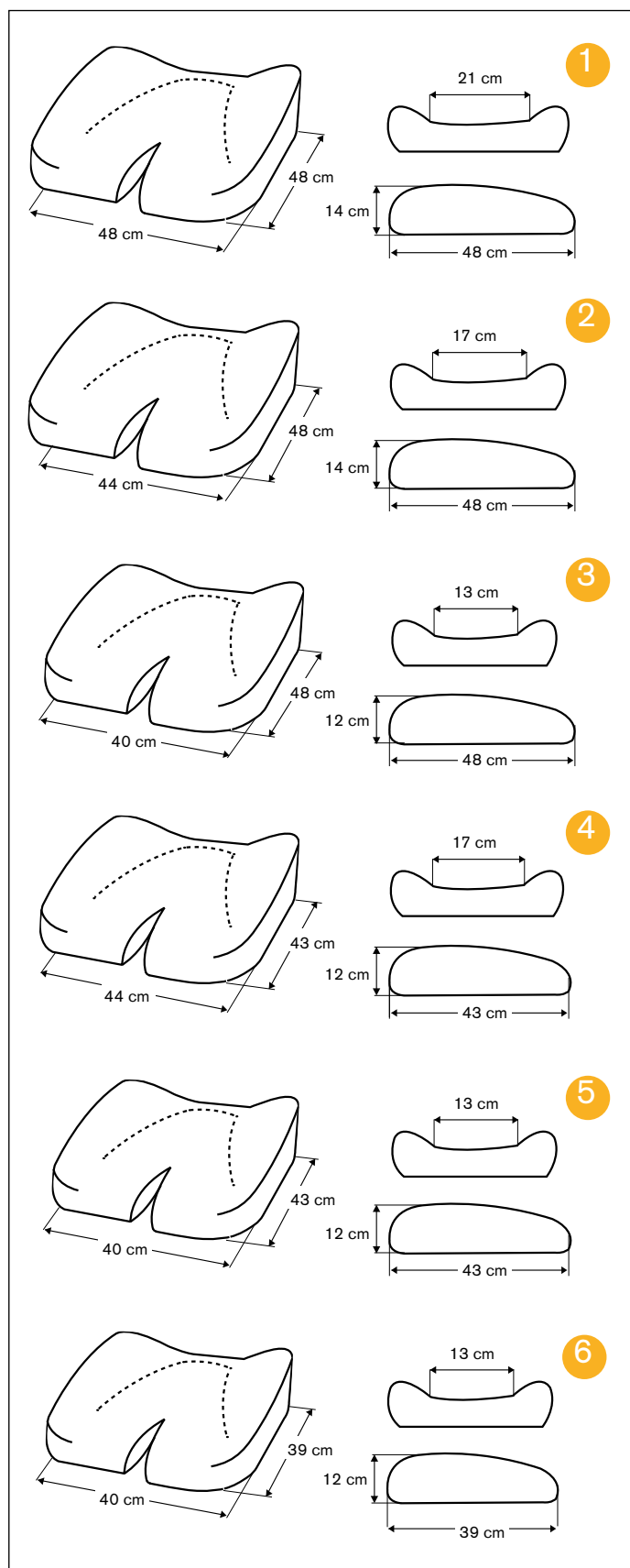

- |   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Størrelse: 48 x 48 cm | Art.nr.: ST241046 |
| 2 | Størrelse: 44 x 48 cm | Art.nr.: ST241546 |
| 3 | Størrelse: 44 x 43 cm | Art.nr.: ST242046 |
| 4 | Størrelse: 40 x 48 cm | Art.nr.: ST242546 |
| 5 | Størrelse: 40 x 43 cm | Art.nr.: ST243046 |
| 6 | Størrelse: 40 x 39 cm | Art.nr.: ST243546 |

# TILVALG/TILBEHØR

| NR. | NAVN                                                                                                                                                                | ART.NR.                              | NR. | NAVN                                                                                                                                                                                           | ART.NR.                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | <b>Stativ 9000 PLUS 48 (voksen)</b><br>100 XL<br>100 SL                                                                                                             | 802659<br>802660                     | 8   | <b>Håndbremsspak med løkke til PLUS-stativ</b><br>35 cm                                                                                                                                        | BD1110                                         |
| 2   | <b>Stativ 9000 PLUS 43 (barn)</b><br>100 XL*, kompletter med bremsepedal<br>100 SL*, kompletter med bremsepedal<br>*tilvalg til stativ, bremsepedal for Plus-stativ | 802657<br>802658<br>802865           | 9   | <b>Kjørebøyle PLUS til PLUS-stativ 48</b><br><b>Kjørebøyle PLUS til PLUS-stativ 43</b>                                                                                                         | PB1011<br>PB2011                               |
| 3   | <b>Stativ 9000 PLUS transport kpl. m. kjørebøyle og håndbrems</b>                                                                                                   | 803793                               | 10  | <b>Kjørehåndtak PLUS</b>                                                                                                                                                                       | PB1010                                         |
| 5   | <b>Firepunktsbremsesett t. PLUS-stativ 43/48</b><br>inkl. stativforlenger foran, OBS! Stativ følger ikke med                                                        | 803503                               | 11  | <b>Ryggmekanisme fast t. høy rygg</b><br>inklusive kjørehåndtak dybdeinnst. 2 stillinger                                                                                                       | 803903                                         |
| 6   | <b>Stativ 9000 PLUS 48 4-bremset</b><br>100 XL omvendt brems                                                                                                        | 804270                               | 12  | <b>Bremsespakfeste til PLUS-stativ</b><br>Justerbart i bredden, 7 hull<br>Justerbart i bredden, 2 hull                                                                                         | 802800<br>802799                               |
| 7   | <b>El-aktuatorsett brems 24 V 1G</b>                                                                                                                                | 804498                               | 13  | <b>Stativforlenger</b><br>Bak for PLUS, Par<br>Frem for PLUS, Par                                                                                                                              | BEX20<br>BEX10                                 |
| 8   | <b>Stor kule 50 mm til håndbremsspak</b>                                                                                                                            | LB1010                               | 14  | <b>Hjul (komplett inklusive bøyle)</b><br>Lenkehjul XL 100 mm<br>Ekstra lettrullet lenkehjul SL 100 mm<br>Ekstra bredt lettrullet lenkehjul BXL 100 mm<br>Lenkehjul 125 mm<br>Lenkehjul 150 mm | 801213<br>801144<br>803162<br>800904<br>800905 |
| 8   | <b>Liten kule, rød 35 mm</b>                                                                                                                                        | LB1020                               |     |                                                                                                                                                                                                |                                                |
| 8   | <b>Liten kule, gummi, svart 40 mm</b>                                                                                                                               | LB1040                               |     |                                                                                                                                                                                                |                                                |
| 8   | <b>Revmatikerkryss</b>                                                                                                                                              | RC1010                               |     |                                                                                                                                                                                                |                                                |
| 8   | <b>Håndbremsspak til PLUS-stativ</b><br>25 cm<br>35 cm<br>45 cm<br>55 cm                                                                                            | BD1020<br>BD1010<br>BD1030<br>BD1040 | 15  | <b>Fotringer 1/8</b><br>Fotring 1/8, oppfellbar h., PLUS 48<br>Fotring 1/8, oppfellbar v., PLUS 48<br>Fotring 1/8, oppfellbar h., PLUS 43<br>Fotring 1/8, oppfellbar v., PLUS 43               | FR1010<br>FR2010<br>FR1020<br>FR2020           |
|     |                                                                                                                                                                     |                                      | 16  | <b>Fotringer 1/4</b><br>Fotring 1/4, oppfellbar, PLUS 48<br>Fotring 1/4, oppfellbar, PLUS 43                                                                                                   | FR3010<br>FR3020                               |





# TILVALG/TILBEHØR



TILBEHØRET PASSER OGSÅ TIL REAL 6100

| NR. | NAVN                                            | ART.NR.  | NR. | NAVN                                          | ART.NR.  |
|-----|-------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------|----------|
| 1   | <b>Benstøtte "Comfort" EL</b>                   |          | 8   | <b>Benstøtte Medic hel</b>                    |          |
|     | H.                                              | 802437   |     | S (18–24 cm)                                  | LS101110 |
|     | V.                                              | 802436   |     | M (23–32 cm)                                  | LS101210 |
|     | Feste til benstøtte "Comfort" EL                | 802979   |     | L (28–41 cm)                                  | LS101310 |
|     |                                                 |          |     | XL (38–51 cm)                                 | LS101410 |
| 2   | <b>Benstøtte, midtmontert (32 x 24 cm)</b>      |          | 9   | <b>Benstøtte Mini Medic hel</b>               |          |
|     | S (30–38 cm)                                    | LS202110 |     | S (18–24 cm)                                  | LS111110 |
|     | L (37–53 cm)                                    | LS202210 |     | M (23–32 cm)                                  | LS111210 |
|     | <b>Benstøtte, midtmontert PLUS (29 x 24 cm)</b> |          |     | L (28–41 cm)                                  | LS111310 |
|     | S (30–38 cm)                                    | LS262110 |     | XL (38–51 cm)                                 | LS111410 |
|     | L (37–53 cm)                                    | LS262210 |     |                                               |          |
|     | <b>Benstøtte, midtmontert Mini</b>              |          | 10  | <b>Benstøtte Mini Medic delt</b>              |          |
|     | S (30–38 cm)                                    | LS212110 |     | S (18–24 cm)                                  | LS161110 |
|     | L (37–53 cm)                                    | LS212210 |     | M (23–32 cm)                                  | LS161210 |
|     |                                                 |          |     | L (28–41 cm)                                  | LS161310 |
|     |                                                 |          |     | XL (38–51 cm)                                 | LS161410 |
| 5   | <b>Kant til fotplate Mobil 6100</b>             | 803211   |     |                                               |          |
| 6   | <b>Knestopp</b>                                 |          | 11  | <b>Benstøtte, midtmontert</b>                 |          |
|     | h. 16 x 8, svart kunstsinn                      | KS111038 |     | Kpl. 30–38 cm fotplate dyp 100 mm             | LS222110 |
|     | v. 16 x 8, svart kunstsinn                      | KS121038 |     | Kpl. 37–53 cm fotplate dyp 100 mm             | LS222210 |
| 7   | <b>Knestopp mini</b>                            |          | 12  | <b>Leggstøttemekanisme, komplett</b>          |          |
|     | h. 12 x 8, svart kunstsinn                      | KS212038 |     | Par Medic benstøtte Br37, pute 15 x 13        | CS101038 |
|     | v. 12 x 8, svart kunstsinn                      | KS222038 |     | Par Medic benstøtte Br25, pute 10 x 10        | CS201138 |
| 8   | <b>Benstøtte Medic delt, par</b>                |          | 13  | <b>Adapter for rullestolbenstøtte Cross</b>   |          |
|     | S (18–24 cm)                                    | LS151110 |     | H.                                            | AD4011   |
|     | M (23–32 cm)                                    | LS151210 |     | V.                                            | AD4012   |
|     | L (28–41 cm)                                    | LS151310 |     | par                                           | AD4010   |
|     | XL (38–51 cm)                                   | LS151410 | 14  | <b>Adapter for rullestolbenstøtte Comfort</b> |          |
|     |                                                 |          |     | H.                                            | AD2011   |
|     |                                                 |          |     | V.                                            | AD2012   |
|     |                                                 |          |     | par                                           | AD2010   |



# SITTEPLATER OG SETEVIPP

 TILBEHØRET PASSER OGSÅ TIL REAL 6100

| NR. | NAVN                                                                                                      | ART.NR.        | NR. | NAVN                                                                                                         | ART.NR.          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | <b>Gassfjærregulert setevipp kpl. inklusive gassfjær</b><br>Regulering ved armlene<br>Regulering ved sete | SAR31<br>SAR30 | 6   | <b>Sittekryss 9000 Vs -15/+23 g.</b><br>Over-/underd. Br40-54 24 V 1G VS<br>Over-/underd. Br33-39 24 V 1G VS | 804506<br>804507 |
| 2   | <b>Sveivregulert setevipp under sete</b><br>Komplett sats for sveivregulert setevipp                      | SAR20          | 7   | <b>Sittekryssmek. 9000/EL Vs-15/+15</b><br>Br29-39 Mini/barn 24 V 1G VS                                      | 804509           |
| 3   | <b>Klargjort for setevipp</b>                                                                             | SAR10          | 8   | <b>Sete, treplate</b>                                                                                        | ST10xx90         |
| 5   | <b>El-aktuatorsett setevipp 24 V 1G</b>                                                                   | 804500         | 9   | <b>Treplate med antiskli</b>                                                                                 | ST10xx61         |
|     |                                                                                                           |                | 10  | <b>Sete ErgoMedic med hygienestoff</b>                                                                       | STxxx60          |




Kontakt Mercado eller se brosjyren  
"Ergonomiske sittesystemer" for mer informasjon om  
sitteplater.



# RYGGER OG RYGGMEKANISMER

 TILBEHØRET PASSER OGSÅ TIL REAL 6100

| NR. | NAVN                              | ART.NR. | NR. | NAVN                                 | ART.NR. |
|-----|-----------------------------------|---------|-----|--------------------------------------|---------|
| 1   | Standard ryggmekanisme, lav rygg  | BRM1000 | 6   | Comfort ryggmekanisme, høy rygg      |         |
| 2   | Standard ryggmekanisme, høy rygg  | BRM4000 |     | Grunn (for barn og coxit-sete)       | 801742  |
| 3   | Medic ryggmekanisme, lav rygg 112 |         |     | Dyp                                  | 801744  |
|     | S 200 mm                          | BRM1800 | 9   | El-aktuatorsett ryggvinkling 24 V 1G | 804499  |
|     | L 240 mm                          | BRM1900 | 10  | Dobbel Medic ryggmekanisme           |         |
|     | XL 340 mm                         | BRM2000 |     | Ryggsokkel feste Medic               | 802859  |
|     | Medic ryggmekanisme, lav rygg 155 |         |     | Ryggsokkel Medic, L 155 mm (2 stk.)  | 801082  |
|     | S 200 mm                          | BRM1500 |     | Ryggsokkel Medic, L 112 mm (2 stk.)  | 801083  |
|     | L 240 mm                          | BRM1600 |     | Ryggsokkel Medic, XL 155 mm (2 stk.) | 801084  |
|     | XL 340 mm                         | BRM1700 |     | Ryggsokkel Medic, XL 112 mm (2 stk.) | 801085  |
| 4   | Medic ryggmekanisme, høy rygg 112 |         |     | Ryggstolpe Medic dobbel              | 802860  |
|     | S 200 mm                          | BRM4800 |     | Ryggmekanisme dobbel Medic kpl.      |         |
|     | L 240 mm                          | BRM4900 |     | L 155 mm, H 240 høy rygg             | BRM5600 |
|     | XL 340 mm                         | BRM5000 |     | L 155 mm, H 340 høy rygg             | BRM5700 |
|     | Medic ryggmekanisme, høy rygg 155 |         |     |                                      |         |
|     | S 200 mm                          | BRM4500 |     |                                      |         |
|     | L 240 mm                          | BRM4600 |     |                                      |         |
|     | XL 340 mm                         | BRM4700 |     |                                      |         |
| 5   | Comfort ryggmekanisme, lav rygg   |         |     |                                      |         |
|     | Grunn (for barn og coxit-sete)    | 801743  |     |                                      |         |
|     | Dyp                               | 801745  |     |                                      |         |

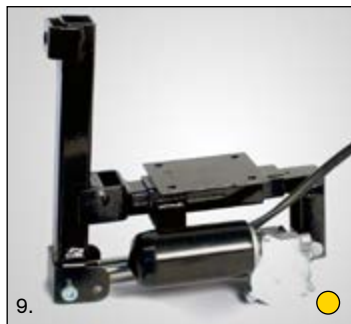

Kontakt Mercado eller se brosjyren  
"Ergonomiske sittesystemer" for mer informasjon om sitteplater.

# ARMLENEPLATER OG ARMLENE

 TILBEHØRET PASSER OGSÅ TIL REAL 6100

| NR. | NAVN                               | ART.NR.           | NR. | NAVN                                            | ART.NR.  |
|-----|------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------|----------|
|     |                                    | Til fellbart      |     |                                                 |          |
|     |                                    | Til ikke-fellbart |     |                                                 |          |
| 1   | <b>Armleneplate ErgoMedic</b>      | <b>armlene</b>    | 6   | <b>Armleneplate Hemiplegi</b>                   | AR406038 |
|     | 25 cm                              | AR151038          |     |                                                 |          |
|     | 30 cm                              | AR152038          | 7   | <b>Armlene</b>                                  |          |
|     | 35 cm                              | AR153038          |     | Armlene 9000 PLUS h., 32 cm                     | 802700   |
|     | 40 cm                              |                   |     | Armlene 9000 PLUS h., 38 cm                     | 802701   |
|     |                                    |                   |     | Armlene 9000 PLUS v., 32 cm                     | 802702   |
|     |                                    |                   |     | Armlene 9000 PLUS v., 38 cm                     | 802703   |
| 2   | <b>Armleneplate Mobil</b>          | <b>armlene</b>    | 8   | <b>Armlene breddebue PLUS h.</b>                | 802698   |
|     | 25 cm                              | AR301038          | 9   | <b>Armlene breddebue PLUS v.</b>                | 802699   |
|     | 30 cm                              | AR302038          |     |                                                 |          |
|     | 35 cm                              | AR303038          | 10  | <b>Armlene 6100 til stol uten setevipp</b>      |          |
|     | 40 cm                              | AR304038          |     | V.                                              | ARM3012  |
|     |                                    |                   |     | H.                                              | ARM3011  |
| 3   | <b>Armleneplate Comfort</b>        |                   | 11  | <b>Armlene 6100 til stol med setevipp</b>       |          |
|     | 30 cm                              |                   |     | V.                                              | ARM3112  |
|     | 35 cm                              |                   |     | H.                                              | ARM3111  |
|     | 40 cm                              |                   | 12  | <b>Hemiplegi mekanisme for fellbart armlene</b> |          |
| 4   | <b>Armleneplate ErgoMedic PLUS</b> |                   |     | par                                             | 802991   |
|     | 42 cm h.                           | AR205138          |     | H.                                              | 802989   |
|     | 42 cm v.                           | AR205238          |     | V.                                              | 802990   |
|     | 30 cm h.                           | AR202138          | 13  | <b>Armlene Hemiplegi 9000 PLUS 32 cm</b>        |          |
|     | 30 cm v.                           | AR202238          |     | H.                                              | 802992   |
|     |                                    |                   |     | V.                                              | 802993   |
| 5   | <b>Armleneplate Mini</b>           |                   |     |                                                 |          |
|     | 25 cm                              |                   |     |                                                 |          |
|     | 30 cm                              |                   |     |                                                 |          |





Kontakt Mercado eller se brosjyren "Ergonomiske sittesystemer" for mer informasjon om armleneplater.



Hvis du vil ha informasjon om armlener for kabelregulering, kan du kontakte Mercado eller se hjemmesiden vår, [www.mercado.se](http://www.mercado.se)



## ANNET TILBEHØR


● TILBEHØRET PASSER OGSÅ TIL REAL 6100

| NR. | NAVN                                                                                                                                                                          | ART.NR.                | NR. | NAVN                                                                                                       | ART.NR.                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | <b>Sving- og justerbar bolstøtte</b><br>Bolstøttemekanisme sving- og justerbar, h.<br>Bolstøttemekanisme sving- og justerbar, v.<br>Tilhørende pute st. (sving- og justerbar) | TS31<br>TS32<br>TS2038 | 8   | <b>Skrittkilefeste</b><br>57 mm komplett<br>115 mm komplett<br>175 mm komplett                             | LD15<br>LD16<br>LD17                 |
| 2   | <b>Rett bolstøtte</b><br>Bolstøttemekanisme rett bue h.<br>Bolstøttemekanisme rett bue v.<br>Pute st. (grå plysj)                                                             | TS11<br>TS12<br>TS1046 | 9   | <b>Hoftebelte inkl. fester og skruer</b><br>S (51–71 cm)<br>M (68–83 cm)<br>L (83–103 cm)                  | HB1010<br>HB1020<br>HB1030           |
| 3   | <b>Buet bolstøtte</b><br>Bolstøttemekanisme buet bue h.<br>Bolstøttemekanisme buet bue v.<br>Pute st. (grå plysj)                                                             | TS21<br>TS22<br>TS1046 |     | <b>Hoftebelte uten feste</b><br>S (51–71 cm)<br>M (68–83 cm)<br>L (83–103 cm)<br>Feste til hoftebelte, par | 800952<br>800953<br>800954<br>800878 |
| 4   | <b>Bord røykfarget 60 x 45 cm*</b><br>t. ikke-fellbart 9000 armlene PLUS<br><b>Bord røykfarget 60 x 45 cm*</b><br>t. fellbart armlene                                         | TA1010<br>TA1030       | 10  | <b>Amputasjonsstøtte</b><br>Amputasjonsstøttemekanisme<br>Feste<br>Amputasjonsstøttepute (grå plysj)       | 800827<br>800786<br>AS1046           |
| 5   | <b>Bord røykfarget 45 x 37 cm*</b><br>t. ikke-fellbart 9000 armlene PLUS<br><b>Bord røykfarget 45 x 37 cm*</b><br>t. fellbart armlene                                         | TA1015<br>TA1035       | 11  | <b>Det finnes overtrekk til alle polstrede detaljer</b>                                                    |                                      |
| 6   | <b>Brett 45 x 30 cm med feste</b>                                                                                                                                             | TA1020                 | 12  | <b>Feste øvre til H-sele</b><br>OBS! Selges stykkvis.                                                      | 804184                               |
| 7   | <b>Skrittkilepute (svart kunstsinn)</b><br>11 cm<br>15 cm                                                                                                                     | LD1038<br>LD2038       |     |                                                                                                            |                                      |

\*På REAL 6100 kombineres med ikke-fellbare PLUS-armlener.



1.

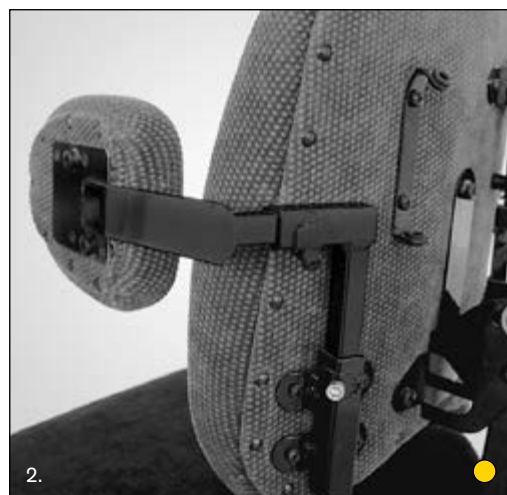


2.



4.



5.

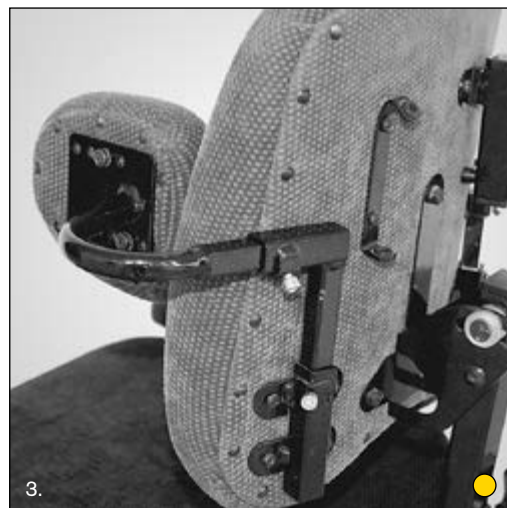

3.



7.



6.



10.



9.



11.

Se [www.mercado.se](http://www.mercado.se) eller kontakt Mercado for mer informasjon om overtrekk til polstrede detaljer. Du finner også mer informasjon om de polstrede detaljene og farger.







12.

OBS! Selges stykkvis.

# POLSTREDE DETALJER OG ELEKTRISKE REGULERINGER

● TILBEHØRET PASSER OGSÅ TIL REAL 6100

| NR. | NAVN                                         | ART.NR. | NR. | NAVN                       | ART.NR. |
|-----|----------------------------------------------|---------|-----|----------------------------|---------|
| 1   | Nakkestøttepute, rett 29 x 16 cm             | NS1046  | 9   | Laderboks 24 V 1G          | 804485  |
| 2   | Nakkestøttepute, buet 31 x 18 cm             | NS3046  | 13  | Håndkontroll 1G 4 funksjon | 804490  |
| 3   | Nakkestøttepute ErgoMedic PLUS 30 x 23       | NS2046  | 15  | Batterilader 24 V 1G       | 804428  |
| 4   | Nakkestøttepute ErgoMedic PLUS 30 x 8        | NS4046  |     |                            |         |
| 5   | Nakkestøttemekanisme universal               |         |     |                            |         |
|     | S (h 28 cm)                                  | NS30    |     |                            |         |
|     | M (h 38 cm)                                  | NS20    |     |                            |         |
|     | L (h 48 cm)                                  | NS10    |     |                            |         |
| 6   | Nakkestøttemekanisme PLUS, justerbar i siden |         |     |                            |         |
|     | S (h 28 cm)                                  | NS31    |     |                            |         |
|     | M (h 38 cm)                                  | NS21    |     |                            |         |
|     | L (h 48 cm)                                  | NS11    |     |                            |         |
| 7   | Sidestøttefeste PLUS                         |         |     |                            |         |
|     | H.                                           | SS11    |     |                            |         |
|     | V.                                           | SS12    |     |                            |         |
|     | par                                          | 802874  |     |                            |         |
| 8   | Sidestøttepute                               |         |     |                            |         |
|     | XS (15 x 8 cm)                               | SS10XX  |     |                            |         |
|     | S (28 x 8 cm)                                | SS20XX  |     |                            |         |
|     | M (25 x 14 cm)                               | SS30XX  |     |                            |         |
|     | L (30 x 16 cm)                               | SS40XX  |     |                            |         |

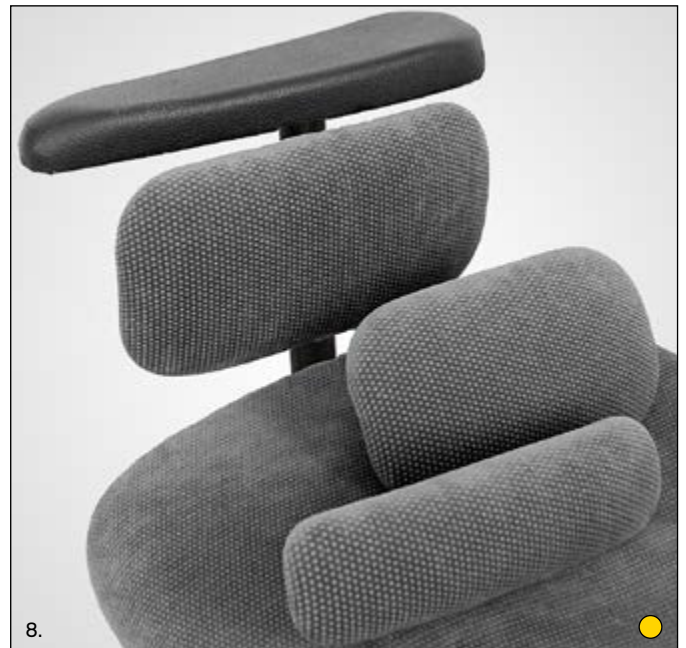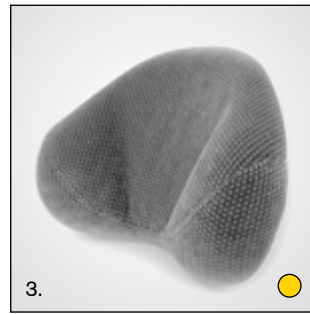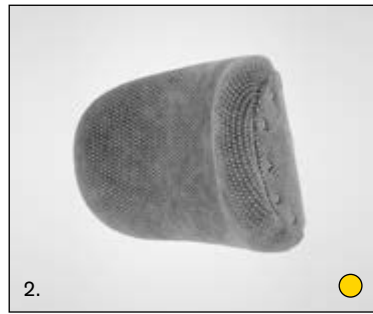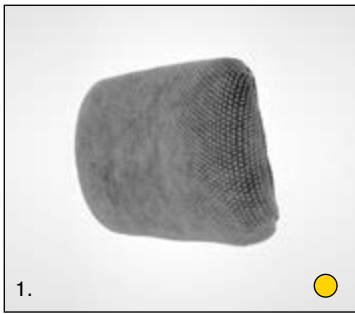

# MONTERINGSANVISNINGER

Amputasjonsstøtte  
Armlene / armlene Hemiplegi  
Armleneplate  
Bytte av batteri  
Benstøtte PLUS  
Benstøtte Medic / knestopp  
Benstøtteadapter  
Bord  
Brett  
Brems pedal  
Bolstøtte  
Coxit-sete  
DUAL arbeidsrullestolsett  
El-brems  
Fixliftomater PLUS  
Fotring PLUS  
Firepunktsbrems  
Gassfjærregulering  
Skrittkile/knedelermekanisme  
Håndbremsfester  
Bytte av hjul  
Hoftebelte  
Kjørebøyle  
Kjørehåndtak  
Kjørehåndtak klinikkstol  
Lenkehjul  
Liftomat EL  
Rygg-/mageplate  
Sidestøtte  
Sitteplate  
Spak  
Leggstøtte  
Leggstøtte, midtmontert  
Overtrekk  
Overtrekk, Basker  
Overtrekk, inkontinens  
Bolstøtte, sving- og justerbar  
H-sele, feste  
Håndbremsspaker  
Nakkestøtte



## Artikkelnummer

800786 Feste til amputasjonsstøtte h.+v.  
AS10XX Amputasjonsstøttepute 25x21  
800827 Amputasjonsstøttemekanisme u. feste og polst. detalj  
**XX = fargekoder**

AS13 Amputasjonsmek. H eller V

## Innhold


1 stk. feste til amputasjonsstøtte 2 stk. sett med nødvendige skruer, muttere og skiver

## Nødvendig verktøy

Unbrakonøkkel 6 mm  
Ringnøkkel 13 mm

## Utførelse

Monter festet til amputasjonsstøtten (1) med to M8-skruer gjennom hullene (2) på festet og gjennom motsvarende hull på fremsiden av sittekrysset. Merk at dersom stolen er vinkeljusterbar, monteres festet i øvre del av sittekrysset (3). Hvis stolen ikke er vinkeljusterbar, monteres festet i nedre del av sittekrysset (4). Lås med låsemutter. Det må brukes skiver på begge sider. Amputasjonsstøtten (7) monteres i åpningene (5) og låses med rattene (6). Juster amputasjonsstøtten i høyde og vinkel slik at amputasjonsstøtteputen ikke kommer ovenfor sitteplaten og i en vinkel som ikke gir strekk i kneleddet.

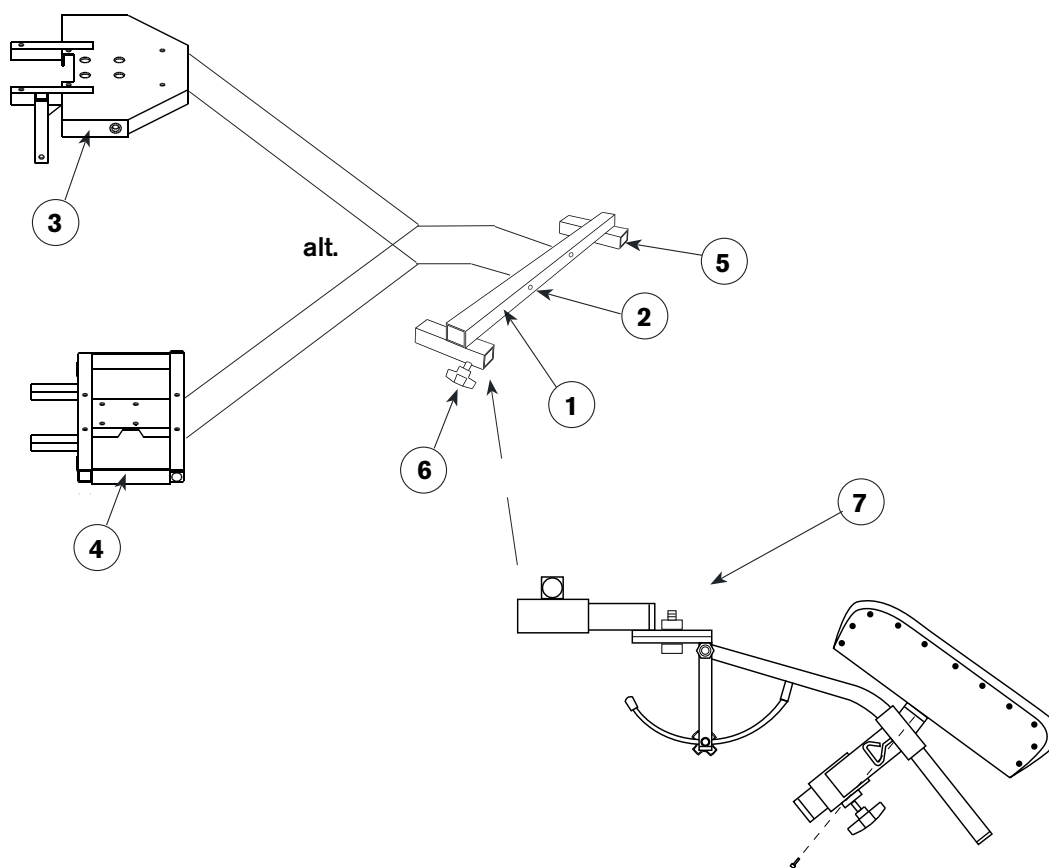




## Artikkelnummer

|         |                                     |        |                                       |
|---------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| ARM1011 | Armlenemek. Plus h. 32 cm           | 802700 | Armlene Plus h. 9000 høyde 32 cm      |
| ARM1012 | Armlenemek. Plus v. 32 cm           | 802702 | Armlene Plus v. 9000 høyde 32 cm      |
| ARM1111 | Armlenemek. Plus h. 38 cm           | 802701 | Armlene Plus h. 9000 høyde 38 cm      |
| ARM1112 | Armlenemek. Plus v. 38 cm           | 802703 | Armlene Plus v. 9000 høyde 38 cm      |
| ARM2011 | Armlenemek. Plus Hemiplegi h. 32 cm | 802992 | Armlene Plus Hemiplegi h. høyde 32 cm |
| ARM2012 | Armlenemek. Plus Hemiplegi v. 32 cm | 802993 | Armlene Plus Hemiplegi v. høyde 32 cm |
| ARM2111 | Armlenemek. Plus Hemiplegi h. 38 cm | 804164 | Armlene Plus Hemiplegi h. høyde 38 cm |
| ARM2112 | Armlenemek. Plus Hemiplegi v. 38 cm | 804165 | Armlene Plus Hemiplegi v. høyde 38 cm |
|         |                                     | 802698 | Armlene breddebue PLUS h. 9000/6100   |
|         |                                     | 802699 | Armlene breddebue PLUS v. 9000/6100   |

## Utførelse

Monter iht. bildet nedenfor.

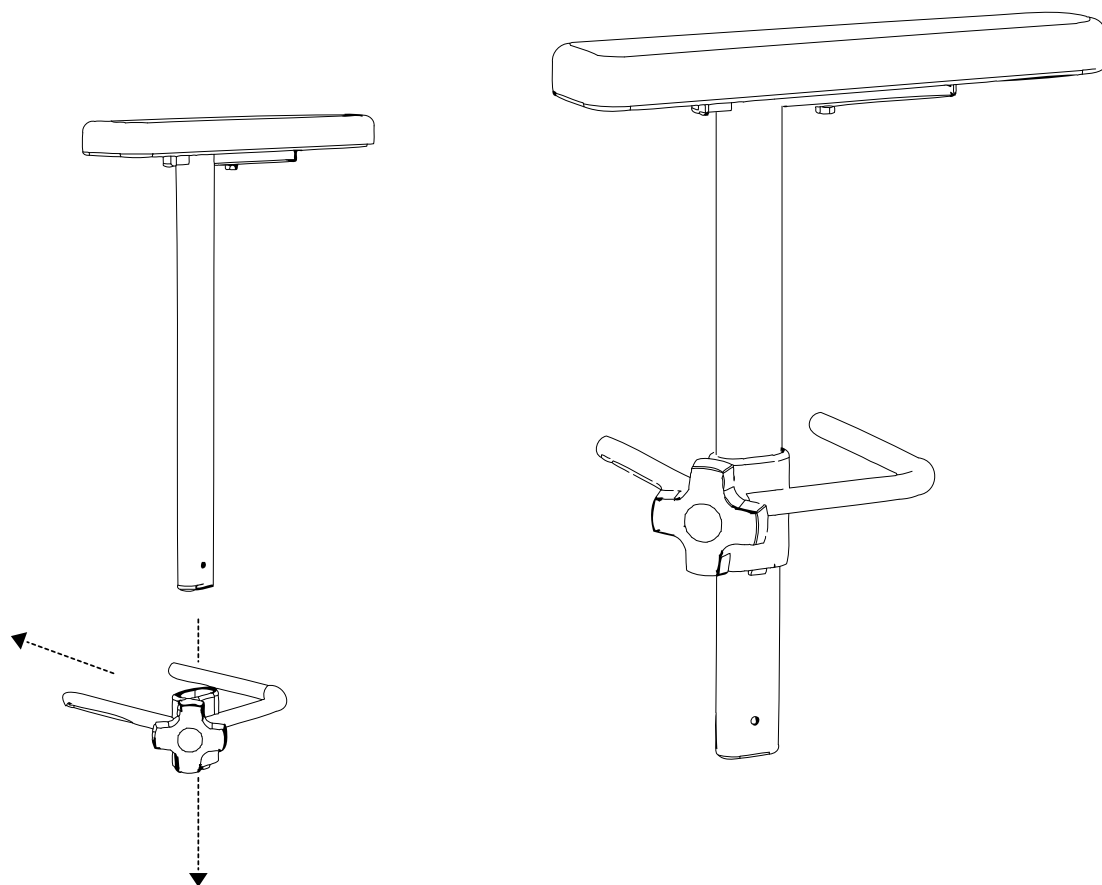

## Artikkelnummer

|          |                                         |         |                               |
|----------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------|
| AR10xxx  | Armleneplate ErgoMedic                  | AR20xxx | Armleneplate ErgoMedic Plus   |
| AR11xxx  | Armleneplate ErgoMedic Mini             | AR31xxx | Armleneplate Mobil 9000 boret |
| AR4060xx | Armleneplate Hemiplegi 45 x 12 cm       | AR50xxx | Armleneplate Comfort          |
| AR51xxx  | Armleneplate ekstra myk                 |         |                               |
| 802039   | K6S M6x25 møbelskrue i svart krom M6x25 |         |                               |

**xx: viser størrelse (25–40 cm) eller side (ErgoMedic PLUS)**

**xx: viser farge**


## Nødvendig verktøy

800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)

## Utførelse

Når du skal montere en ny armleneplate, må du skru løs skruen på undersiden av armleneplaten med Mercado-nøkkelen.

Monter deretter den nye armleneplaten og stram skruen. Juster armlenet i bredden slik at det kommer inntil kroppen, og i høyden slik at det gir støtte til albuen når skulderen er senket.

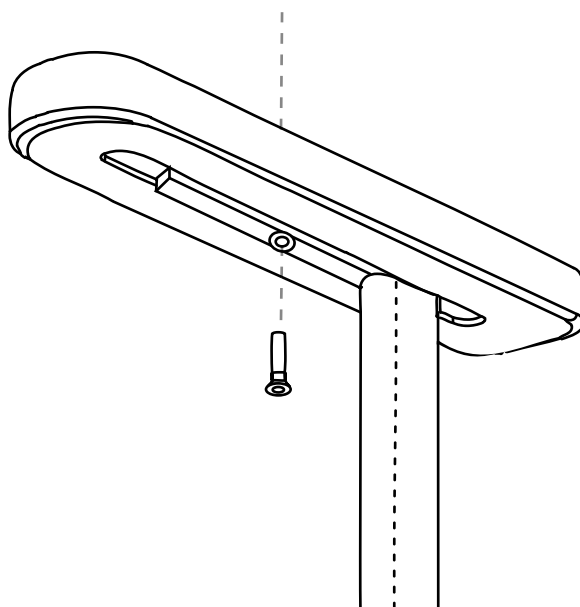

## Artikkelnummer

804496

Batteri 24 V 1G 2 Ah

## Utstyr/verktøy

Skrutrekker Torx (TX15)

Vernebriller

Det kan være nødvendig med en tang eller lignende

## Utførelse

Snu stolen opp ned. Løsne remmen, og løsne deretter tilkoblingene til elektronikkboksen. Ta elektronikkboksen av stolen.

1. Ta av de selvheftende gummiplatene fra boksen.



2. Løsne skruene som holder boksen sammen.



3. Åpne boksen, koble fra pluss- og minuskablene (det kan være nødvendig med tang i dette trinnet) og fjern de gamle batteriene.



4. Sett i de nye batteriene i boksen og koble til pluss- og minuskablene. (Obs! Det kan oppstå gnister ved tilkobling av pluss- og minuskablene, så bruk vernebriller.)



5. Lukk boksen igjen og skru i skruene som holder den sammen.



6. Sett på de selvheftende gummiplatene på boksen.



Sett elektronikkboksen i holderen på stolen igjen. Koble ledningene til de elektriske funksjonene til elektronikkboksen. Spenn fast elektronikkboksen med strammebånd. Snu stolen riktig vei igjen.

## Artikkelnummer

802872 Benstøtte PLUS delt barn  
802873 Benstøtte PLUS delt voksen

## Nødvendig verktøy

800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)

## Utførelse

Monter det firkantede festerøret (1) i benstøttefestet under setets fremkant.

Juster til riktig bredde i siden og trekk til med T-nøkkelen.

Plasser den vertikale tappen på benstøtten (7) i hullet ment for dette i henhold til bildet, samtidig som du holder knappen (2) nede.

Sørg for at den klikker på plass.

Det er enkelt å ta benstøtten av og på med denne funksjonen.

Dybdejustering gjøres ved hjelp av rattet (3).


Vinkelen på benstøtten stilles inn ved hjelp av rattet (4).

Juster lengden på benstøtten med rattet (5) slik at låret hviler mot setet. Still inn vinkelen på fotplaten med låseskruen (6) slik at foten får avlastning mot hele fotplaten uten at den glir av.

Det er en skala på det indre røret som du kan bruke som hjelp.

Bildet viser høyre benstøtte.

**OBS! Ikke glem å stramme ratt og skruer godt etter justering.**

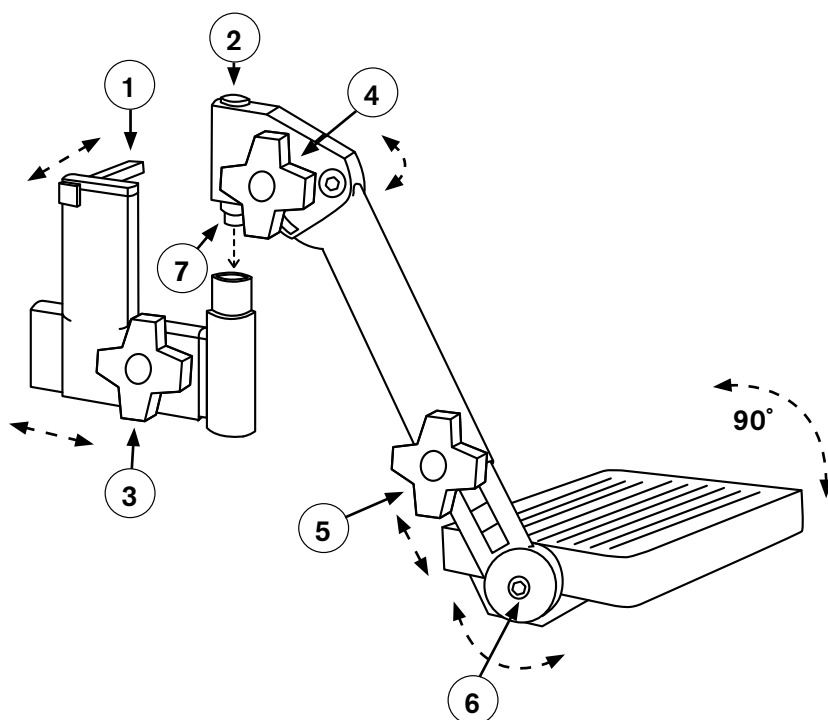

## Artikkelnummer

|          |                                                                                             |          |                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LS109001 | Benstøttefeste Medic t. B37 t. setedybde $\geq 48$                                          | LS109002 | Benstøttefeste Medic t. B37 t. setedybde $\geq 44$                                               |
| LS451310 | Benstøtte Medic Plus delt fotpl. B31 x D22,<br>Lengde L 28–41 cm, par                       | LS119002 | Benstøttefeste Medic t. B25 t. setedybde mindre enn 48                                           |
| LS15xxxx | Benstøtte Medic delt fotplate B37 x D21,<br>H eller V, lengde 18–24, 23–32, 28–41, 38–51 CM | LS16xxxx | Benstøtte Medic delt fotplate Mini B25 x D18,<br>H eller V, lengde 18–24, 23–32, 28–41, 38–51 CM |
| KS11     | Knestoppmekanisme h. u. pute                                                                | KS12     | Knestoppmekanisme v. u. pute                                                                     |
| KS111038 | Knestopp h. komplett 16 x 8 kunstsinn svart                                                 | KS121038 | Knestopp v. komplett 16 x 8 kunstsinn svart                                                      |
| KS1038   | Knestopp pute 16 x 8 kunstsinn svart                                                        |          |                                                                                                  |

xxxx: De to første (11–14) bestemmer lengden, de to siste (10–12) bestemmer h., v., par

## Innhold

1 stk. benstøttefeste 1 stk. sett med nødvendige skruer, muttere og skiver / innsatsmuttere til tre

## Nødvendig verktøy

Unbrakonøkkel 5 alt. 6 mm Ringnøkkel 13 mm  
 Stjerneskrutrekker  
 800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)

## Utførelse

Monter benstøttefestet (1) alt. (7) med to M8-skruer gjennom hullene (2) på festet og gjennom motsvarende hull på frem-siden av sittekrysset (3). Merk at dersom stolen er vinkeljusterbar, monteres festet i øvre del av sittekrysset (3). Hvis stolen ikke er vinkeljusterbar, monteres festet i sittekrysset (4).

Lås med låsemutter. Det må brukes skiver på begge sider.

Fest benstøttefestet til stort sete (1) slik: Mål med benstøttefestet (1) og marker hullene i sitteplaten.


Bor 10 mm hull gjennom sitteplaten.

Monter deretter de medfølgende innsatsmutterne.

Skru så fast benstøttefestet (1) ved å sette skruer i hullene (5).

Medic-benstøtten monteres deretter i åpningene (6).

Ring (8) må løsnes (OBS! to skruer) for at man skal kunne montere knestopp.

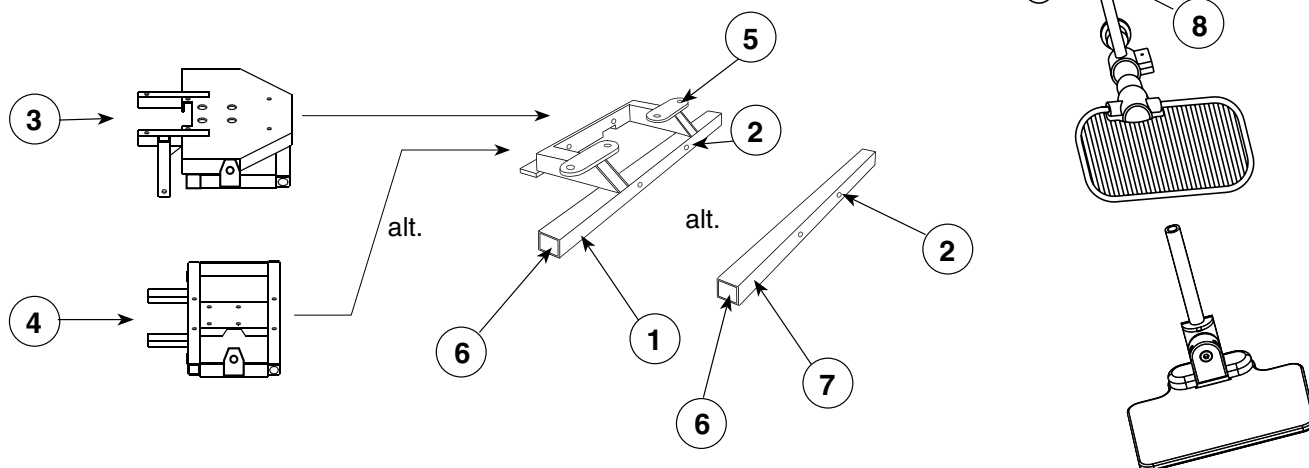

## Artikkelnummer

## ADAPTER PAR

AD2010 Comfort

AD4010 Cross

## ADAPTER HØYRE

AD2011 Comfort

AD4011 Cross

## ADAPTER VENSTRE

AD2012 Comfort

AD4012 Cross

## Nødvendig verktøy

800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)


## Utførelse

Monter adapteren (1) på venstre eller høyre armlenebue (2) i de fremre eller bakre hullene, avhengig av størrelsen på stolen. **OBS! De ovale hullene skal være plassert ut fra stolen.**

Fest armlenebuen (2) på sittekrysset (3). Still inn riktig armlenebredde, og lås ved hjelp av rattet (4). Lås deretter adapteren i riktig stilling ved å stramme skruene (5) med T-nøkkelen. Still inn riktig dybde, og lås ved hjelp av rattet (6). Heng på benstøtten i adapterfestet og juster lengden på benstøtten med vrideren (7) slik at låret hviler mot setet.

Still inn vinkelen på fotplaten ved å løsne på skruene (8) med T-nøkkelen slik at foten får avlastning mot hele fotplaten uten å gli av.

**OBS! Stolen må ikke løftes ved hjelp av benstøtten.**

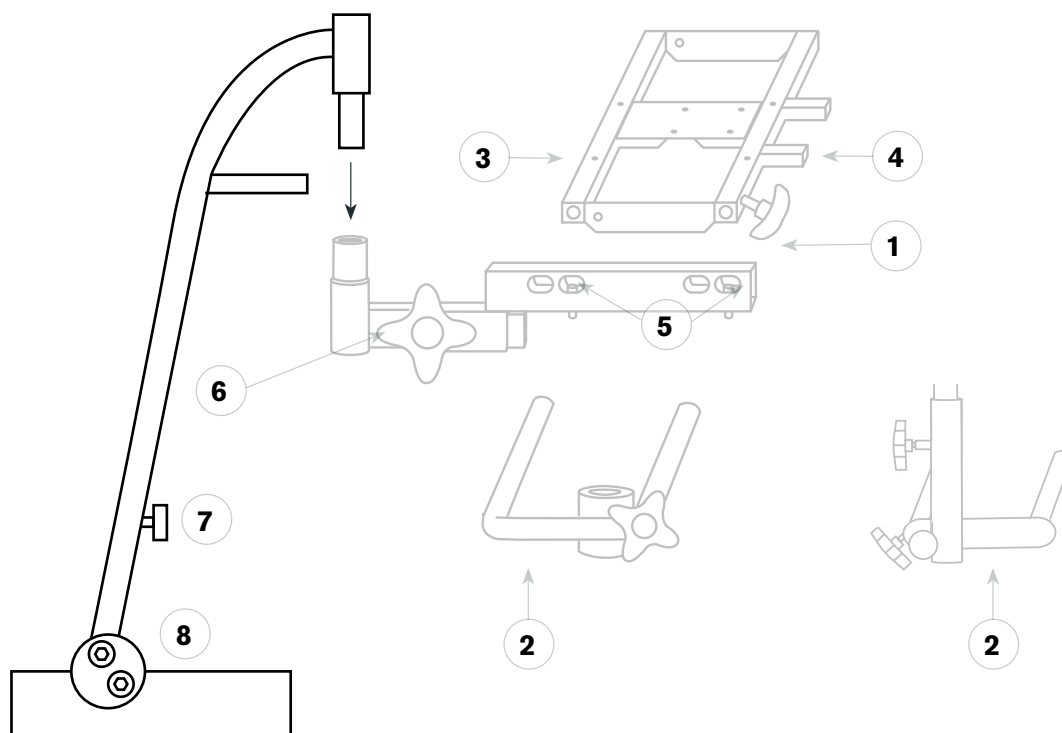

## Artikkelnummer

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| TA1010 | Bord 60 x 45 cm kpl. t. REAL 9000 armlene PLUS |
| TA1030 | Bord 60 x 45 cm t. fellbart armlene            |
| TA1015 | Bord 45 x 37 cm kpl. t. REAL 9000 armlene PLUS |
| TA1035 | Bord 45 x 37 cm t. fellbart armlene            |

## Nødvendig verktøy

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 800897 | T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen) |
|--------|-------------------------------------------------|


## Utførelse

Monter bordet iht. bilde A og deretter bilde B på venstre armlene.

Monter armlenet igjen i egnet høyde slik at det støtter albuen når skulderen er senket.

Juster festet (1) til ønsket høyde, fritt fra eventuelle andre reguleringer. Bordet kan justeres i høyden slik at man kan jobbe på bordplaten uten å måtte løfte skuldrene. Plasser bordet på armlenet og sentrer det i bredden ved hjelp av skruen (3). Du kan justere plasseringen i dybden ved hjelp av rattet (2).

Bordet kan foldes til side eller tas bort for å gi tilgang til stolen. I begge tilfellene er det bare rattet som brukes (2).

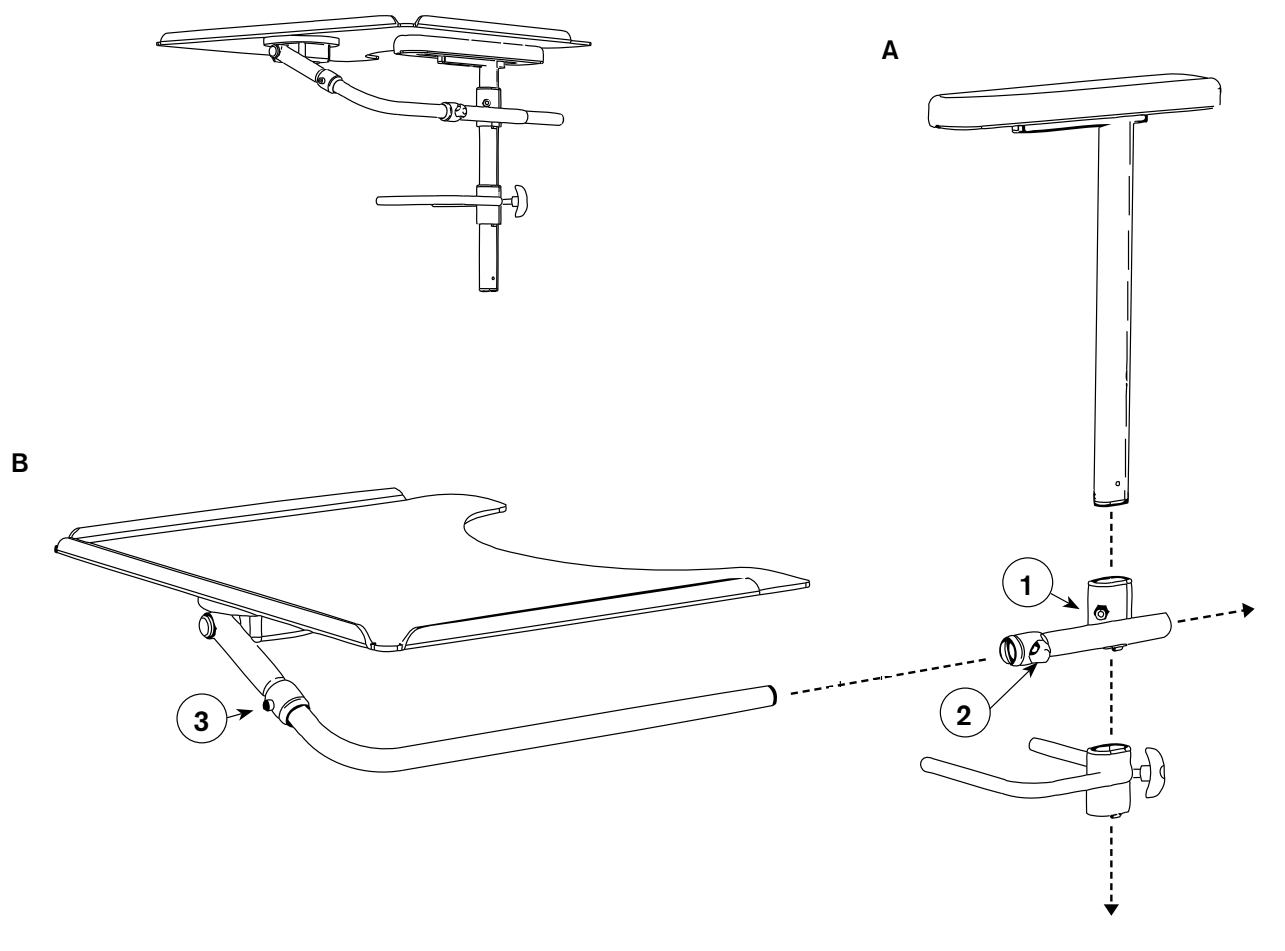



## Artikkelnummer

TA1020 Brett 45 x 30 kpl. Real 6100 / Real 9000

## Nødvendig verktøy

800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)

## Utførelse

Monter adapteren (1) på venstre eller høyre armlenebue (2).

**OBS! De ovale hullene skal være plassert ut fra stolen.**

Fest armlenebuen (2) på sittekrysset (3). Still inn riktig armlenebredde, og lås ved hjelp av rattet (4).

Lås deretter adapteren i riktig stilling ved å stramme skruene (5) med T-nøkkelen.

Du justerer plasseringen av brettet i dybden ved hjelp av skruene (8).


Den laveste høyden på brettet justeres med låseringen (7).

Brettet kan heves/senkes og svinges med rattet (6). Ved belastning må rattet (6) være strammet.

På undersiden av brettet er det et ratt (9) som låser rotasjonen av brettet.

Brettet kan monteres på høyre eller venstre side.

Sørg for at alle ratt og vridere er låst når brettet belastes.

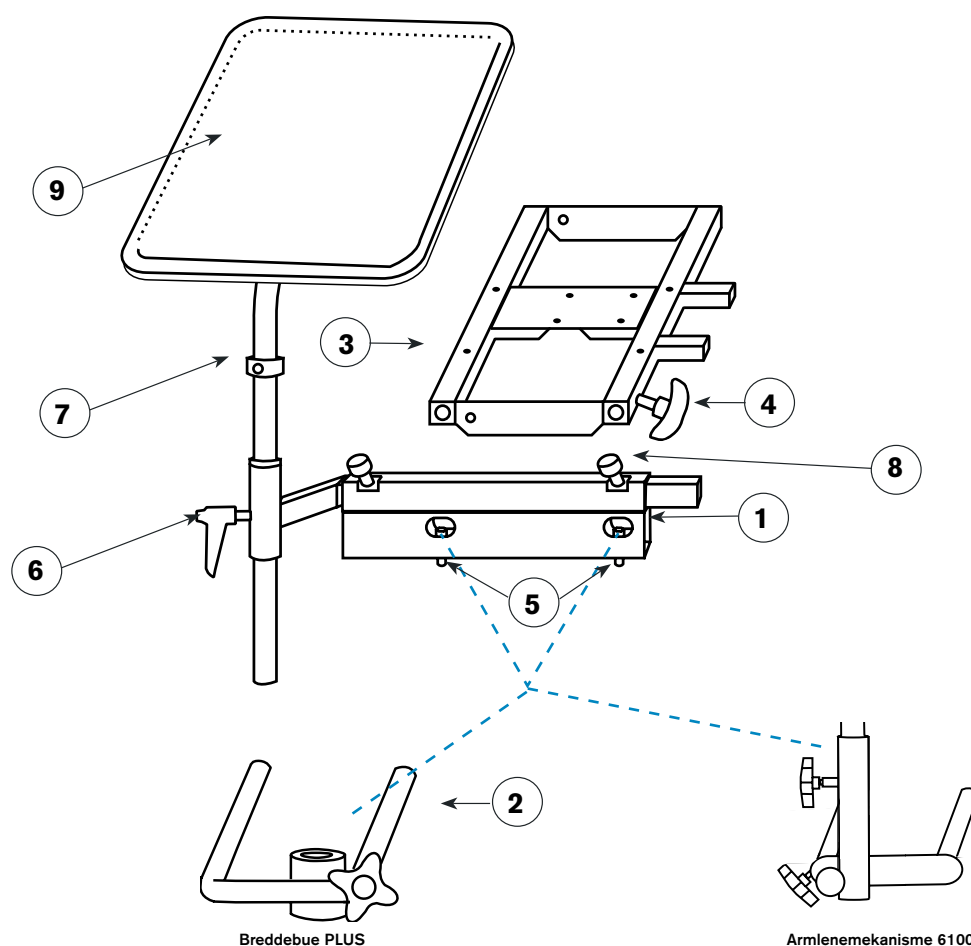

## Artikkelnummer

Bremsepedal t. PLUS 20 mm bremseaksel 802865

## Nødvendig verktøy

T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen) 800897

## Utførelse

Plasser bremsepedalen på valgfritt sted med bremseakselen.

Monter de to brakettene (2) og de fire skruene (1) løst.

Prøv ut en egnet stilling for pedalen slik at det er enkelt å styre. Sørg for at ingen deler kommer borti noe.

Trekk skruene hardt til.

Sørg for at bremsespaken er demontert eller sitter ordentlig fast ved bruk av fotbrems.

**OBS!** Pedalen kan bare monteres på "PLUS-stativ med omvendt bremsefunksjon".



## Artikkelnummer

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Bolstøttemek. Medic rett h. u. polstrede detaljer  | TS11   |
| Bolstøttemek. Medic rett v.* u. polstrede detaljer | TS12   |
| Bolstøttemek. Medic buet h. u. polstrede detaljer  | TS21   |
| Bolstøttemek. Medic buet v. u. polstrede detaljer  | TS22   |
| Bolstøttepute 15 x 13                              | TS10XX |

**XX fargekoder står i prislisten  
og i prøveprotokollen.**

\* Viser på bildet.

## Nødvendig verktøy

T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen) 800897

Stjerneskrutrekker/skrutrekker


## Utførelse

Monter bolstøtten iht. bildet.

Skrue i skruene (4) i de eksisterende gjengene på bolstøtteputen. De kan justeres i fire forskjellige plasseringer i dybden.

Juster høyden/bredden på bolstøtten i midtre posisjon før montering. Prøv ut egnet plassering av bolstøtten og skru fast bolstøtten i ryggplaten med de selvborende treskruene som følger med (3).

Bolstøtten justeres i høyden ved hjelp av skrue (2), og i siden ved hjelp av skrue (1). Du kan justere plasseringen av bolstøtten i dybden ved å flytte skruene (4) i hullene i buen.

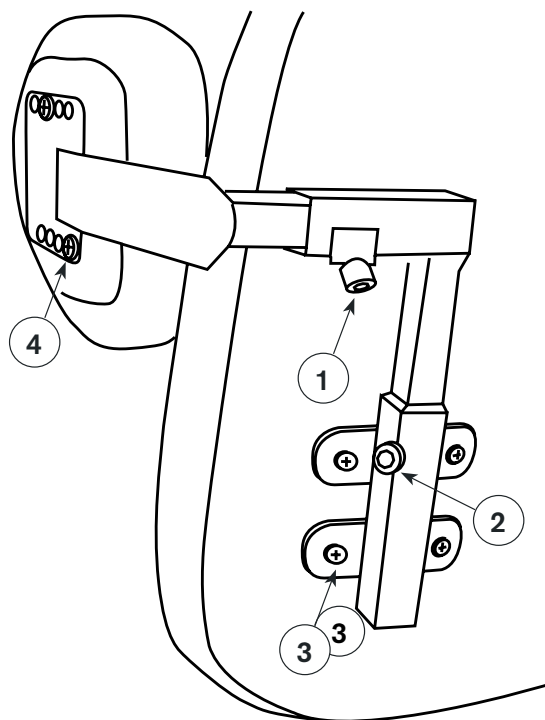

**Monteringssettet inneholder**

- 1 stk. fixliftomat med feste (1)
- 4 stk. låsemuttere M8 (2)

**Nødvendig verktøy**

- 800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)
- 6 mm unbrakonøkkel
- 10 mm ringnøkkel

**Utførelse**

Demonter først fixliftomaten (1) fra stativet ved å løsne de to skruene som sitter på midtrøret på stativet og klemmer fixliftomaten fast.


Skruløs sitteplaten (3) fra sittekrysset ved å skru ut de åtte skruene (4) som sitter i sittekrysset.

Demonter fixliftomaten ved å skru ut skruene (5) som sammen med låsemutterne (2) holder sittekrysset sammen med fixliftomaten.

Monter styrespaken.

Monter deretter fixliftomaten i omvendt rekkefølge. Bytt ut låsemutterne (2) med nye.

Skruene i stativet strammes med 16 Nm på den øvre skruen og 20 Nm på den nedre.

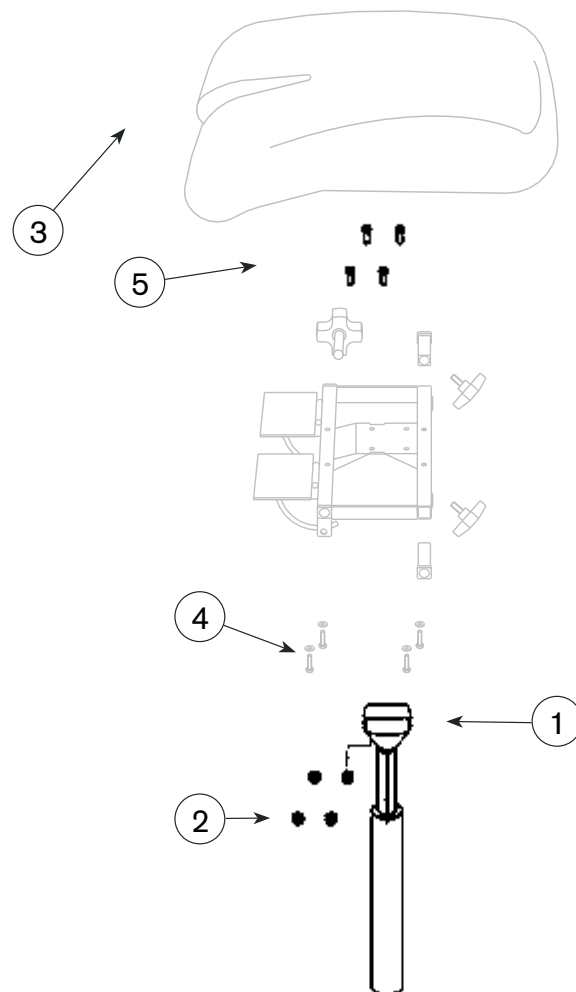

## Artikkelnummer

803261 Arbeidsrullestolsett Dual (til Plus-stativ 43)

803259 Arbeidsrullestolsett Dual (til Plus-stativ 48)

## Nødvendig verktøy

Ringnøkkel 24 mm

Ringnøkkel 22 mm

Ringnøkkel 19 mm (nedslipt)

Unbrakonøkkel 5 mm

Unbrakonøkkel 6 mm

Loctite 243

**OBS! Stolen må kompletteres med et el-bremsesett før den tas i bruk!**

803077 El-aktuatorsett til el-bremse – manuell stol 9000 PLUS inkl. batteri

803276 El-aktuator- + relésett til brems – EL-stol inkl. styreboks PLUS

## Utførelse

Ved behov må du starte med å justere mulig glippe mellom akselbøssingen og mutteren på hjulet. Kulen på bøssingen fungerer som låsesperre.

Demonter begge bakhjulene på stolen. Bruk ringnøkkel 19 mm. Skruene er låst med Loctite og sitter derfor stramt. Påfør ny Loctite 243 på skruene og monter hjulene på arbeidsrullestolsettet (1) igjen. Stram godt (80–90 Nm).

Monter rullestolsettet (2) på stolen der bakhjulene satt før. Påfør Loctite 243 på skruene (3) og stram dem godt (80–90 Nm). Bruk ringnøkkel 19 mm. Stram deretter klemmetilkoblingen med skruen (4). Bruk unbrakonøkkel 6 mm.

Akselbøssingen (5) monteres i det øverste av de tre hullene (100 mm hjul) med sfæriske skiver på hver side av festet med den konvekse skiven innerst. Deretter monteres mutteren. Bruk en gjennomgående 12 mm aksel til å få hjulene til å stå rett i ferdretsretningen, stram bøssingen med en 22 mm nøkkel og hold imot med en 24 mm fastnøkkel.


Hvis en gjennomgående aksel ikke er tilgjengelig, må du utføre en visuell gransking av hjulenes stilling. Det øvre hullet skal brukes når stolen er utstyrt med 100 mm lenkehjul. Det mellomste hullet er ment til 125 mm lenkehjul, og det nederste til 150 mm hjul.

Monter rullestolhjulene (6) ved å trykke inn knappen på hjulakselen (7) og føre inn hjulbolten i navet på hjulet og deretter på akselbøssingen. Slipp knappen og prøv å trekke ut hjulet for å sjekke at det er låst på plass.

Den vanlige bremsen på stolen må ikke brukes hvis stolen er utstyrt med rullestolsett. Bremsespaken må derfor fjernes.

Det er mulig med breddejustering gjennom å løsne de korte skruene (8). Bruk unbrakonøkkel 5 mm. Skyv deretter røret (9) til ønsket stilling. Sett alle skruene på plass igjen og stram dem.

De korte skruene fungerer som veltesperre.

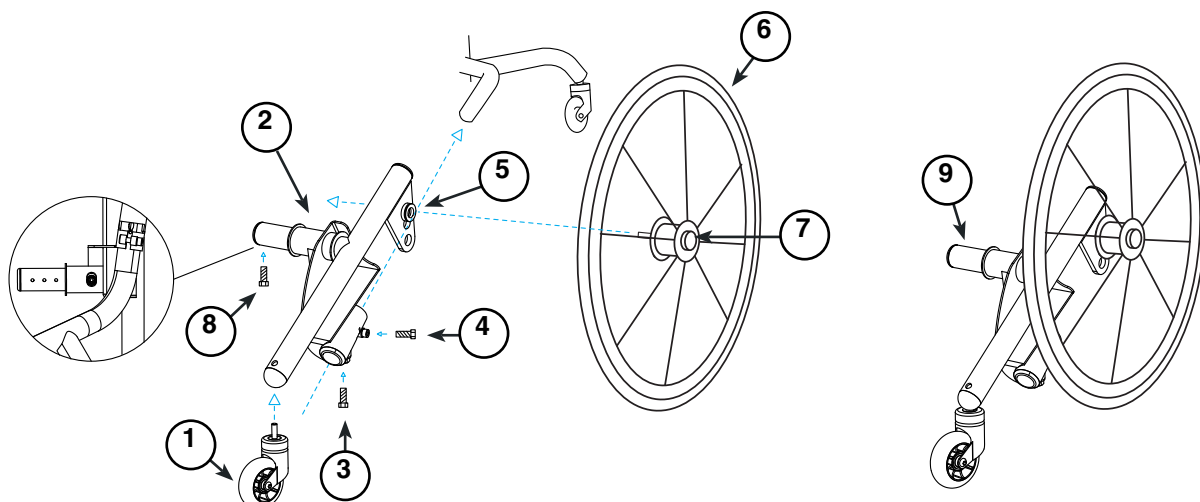**Disse må være montert når stolen tas i bruk!**

## Artikkelnummer

804498 El-aktuatorsett til el-bremse for PLUS inklusive relékort og styreboks

## Nødvendig verktøy

5 mm unbrakonøkkel


6 mm unbrakonøkkel





## Utførelse

1. Demonter braketten (1) fra aksselfestet (2), fire M6-skruer.
2. Midtfestet (3) monteres på stativet i høyde med sporet iht. den stiplede linjen på bildet. Stram den bakre M8-skruen. Sørg for at de to delene av braketten i midtfestet har en klaring på ca. 1 mm til el-aktuatorens feste. Stram deretter de fremre M8-skrue (4) for hånd.
3. Sørg for at bremsen på stolen er satt på. Monter braketten (1) på aksselfestet (2) igjen slik at det er fast rundt bremseakselen. Stram skruene for hånd (ikke lås dem). Koble til strømmen ved å koble kontakten på el-bremsen til port nummer fire i el-systemet. Aktiver bremsen slik at aktuatoren er i maksimal posisjon.
4. Lås de to fremre M8-skrue (4) i midtfestet. De to platene skal sitte sammen. Lås deretter de fire M6-skruene på aksselfestet (1) godt, med moment 9,8 Nm. Kontroller el-bremsens funksjon.



*El-bremse montert på stol.*

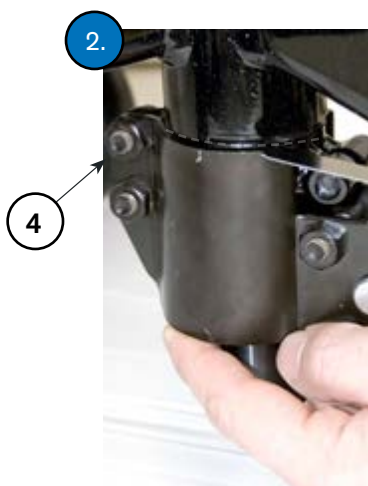

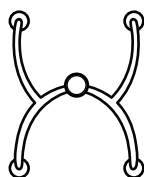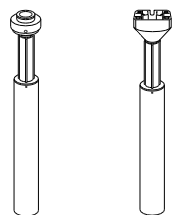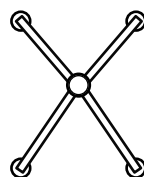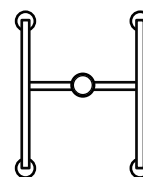
**STATIV  
PLUS**

**STATIV  
Nåværende \* X & H**

**STATIV  
Eldre\*\* X & H**

| TYPE FIXLIFTOMAT | ARTIKKELNUMMER |          | Klemmetilkobling |       | Klemmetilkobling |       | Klemmetilkobling |       |
|------------------|----------------|----------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | Rotasjon       | Alufeste | Øvre             | Nedre | Øvre             | Nedre | Øvre             | Nedre |
| 140 mm <55 kg    | 803980         | 803979   | ***              | 24 Nm | ***              | 18 Nm | ***              | 24 Nm |
| 140 mm 55–90 kg  | 803982         | 803981   | ***              | 24 Nm | ***              | 18 Nm | ***              | 24 Nm |
| 140 mm 90–130 kg | 803984         | 803983   | ***              | 24 Nm | ***              | 18 Nm | ***              | 24 Nm |
| 200 mm <55 kg    | 803986         | 803985   | ***              | 24 Nm | ***              | 18 Nm | ***              | 24 Nm |
| 200 mm 55–90 kg  | 803988         | 803987   | ***              | 24 Nm | ***              | 18 Nm | ***              | 24 Nm |
| 200 mm 90–130 kg | 803990         | 803989   | ***              | 24 Nm | ***              | 18 Nm | ***              | 24 Nm |

## FIXLIFTOMATER MED GROVT YTTERØR

| TYPE FIXLIFTOMAT | ARTIKKELNUMMER |          | Klemmetilkobling |       | Klemmetilkobling |       | Klemmetilkobling |       |
|------------------|----------------|----------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | Rotasjon       | Alufeste | Øvre             | Nedre | Øvre             | Nedre | Øvre             | Nedre |
| 140 mm <55 kg    | 803980         | 803979   | 24 Nm            | 24 Nm | 18 Nm            | 18 Nm | 24 Nm            | 24 Nm |
| 140 mm 55–90 kg  | 803982         | 803981   | 24 Nm            | 24 Nm | 18 Nm            | 18 Nm | 24 Nm            | 24 Nm |
| 140 mm 90–140 kg | 803984         | 803983   | 24 Nm            | 24 Nm | 18 Nm            | 18 Nm | 24 Nm            | 24 Nm |
| 200 mm <55 kg    | 803986         | 803985   | 24 Nm            | 24 Nm | 18 Nm            | 18 Nm | 24 Nm            | 24 Nm |
| 200 mm 55–90 kg  | 803988         | 803987   | 24 Nm            | 24 Nm | 18 Nm            | 18 Nm | 24 Nm            | 24 Nm |
| 200 mm 90–140 kg | 803990         | 803989   | 24 Nm            | 24 Nm | 18 Nm            | 18 Nm | 24 Nm            | 24 Nm |

Testen er utført på "nye" fixliftomater fra Suspa samt oljede skruer.


\*Se bilde 1 \*\*Se bilde 2

### SLISSER


På Mercados eldre stativer er ikke slissen ved klemmetilkoblingene like dyp som på denåværende stativene våre.

\*\*\*

Klemmetilkoblingen strammes så hardt at setet enkelt kan heves og senkes.

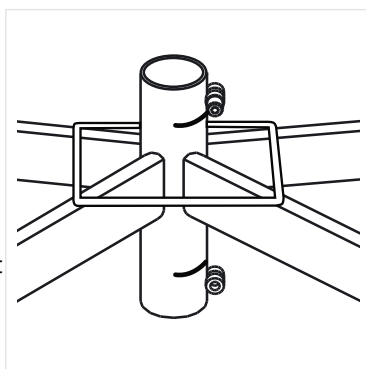

\*Bilde 1 – nåværende stativ med dyper slisse.

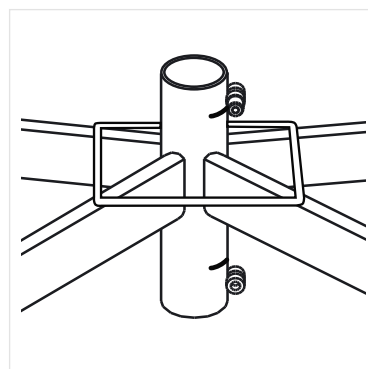

\*\*Bilde 2 – eldre stativ med grunnere slisse.



## Artikkelnummer


FR3010 Fotring 1/4 oppfellbar t. PLUS-stativ 48    FR3020 Fotring 1/4 oppfellbar t. PLUS-stativ 43  
FR1010 Fotring 1/8 h. oppfellbar t. PLUS-stativ 48    FR1020 Fotring 1/8 h. oppfellbar t. PLUS-stativ 43  
FR2010 Fotring 1/8 v. oppfellbar t. PLUS-stativ 48    FR2020 Fotring 1/8 v. oppfellbar t. PLUS-stativ 43

## Nødvendig verktøy

800897                  6 mm unbrakonøkkel

## Utførelse

Monter fotringen iht. bildet nedenfor. Trekk så vidt til skruene (1). Juster fotringen i høyden slik at overkanten på klemmetilkoblingen ligger på linje med underkanten på slissen i midtrøret. Sentrer fotringen sidelengs. Stram skruene (1) godt. Kontroller at fotringen fungerer som den skal.

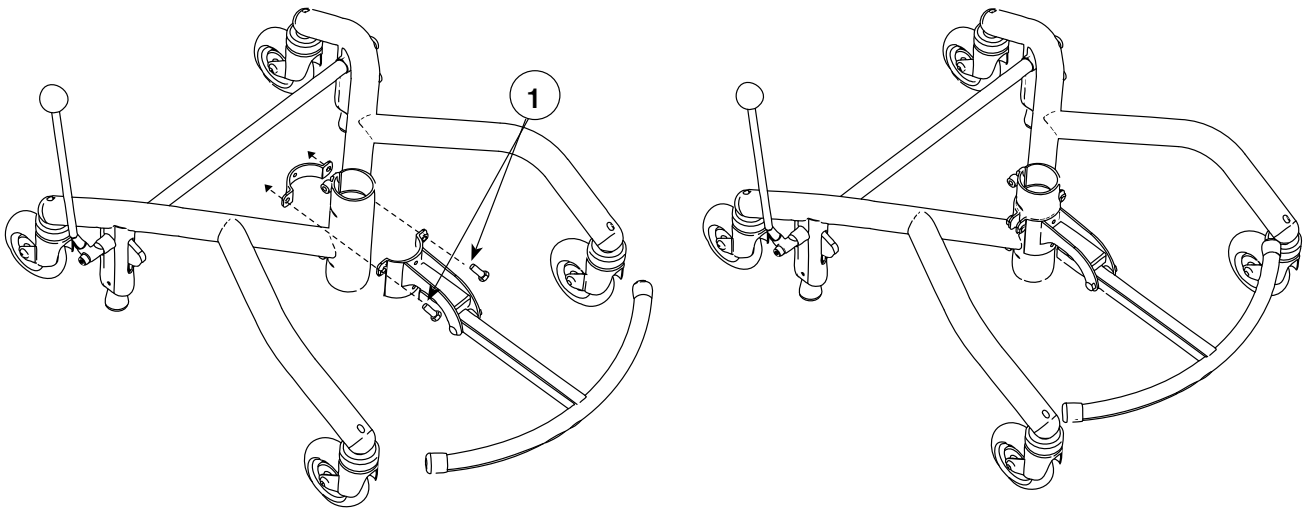

OBS! Fotringen skal brukes til avlastning når stolen brukes. Den er ikke ment å bære hele vekten av brukeren.

## Artikkelnummer

803503 Firebremssett til PLUS-stativ 48 inkl. stativforlenger foran

## Nødvendig verktøy



Unbrakonøkkel 6 mm

Ringnøkkel 19 mm

## Utførelse

1. Demonter lenkehjulene (1) fra stativet med en 19 mm ringnøkkel som er modifisert\* til dette formålet.
2. Monter stativforlengerne (2) på stativet.
3. Påfør Loctite 243 på M12-skruen (3). Monter skruen og skiven.  
Stram godt med ringnøkkel 19 mm.
4. Stram klemmetilkoblingen med skruen (4) godt med unbrakonøkkel 6 mm.
5. Påfør Loctite 243 på M12-skruen (5) på lenkehjulene.
6. Monter lenkehjulene i stativforlengeren. Stram godt med ringnøkkel 19 mm.
7. Monter bremsestaket på den bakre bremsefoten (6).
8. Kontroller at stolen står stødig på et jevnt underlag før den tas i bruk.
9. Kontroller bremsefunksjonen.

*\*Ringnøkkelen er nedslipt til en høyde på 7 mm.*

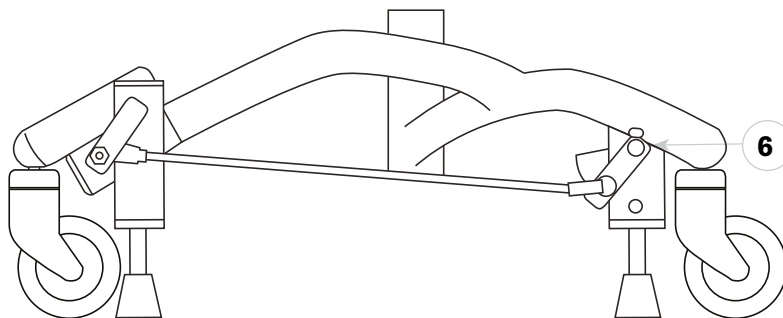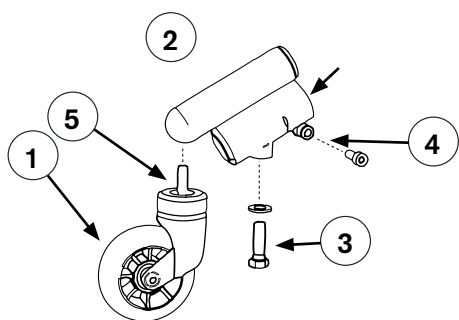

## Artikkelnummer

SAR31 Setevinkelsett til grunnmodell for PLUS-armlene

## Nødvendig verktøy

Nøkkel Torx str. 25

10 mm og 8 mm fastnøkler

## Utførelse

Plasser spaken under armlenet iht. bilde 1. Spakfestet legges mot utsiden av firkantrøret.



Fremkanten på spaken og armlenet skal normalt være på linje. Stram de to treskruene i treplaten på armlenet. Skruene er selvborende.

Monter gassfjærene og de medfølgende detaljene iht. bilde 2. **OBS! Ikke glem låsepinnene!**

(Ved montering av gassfjæren på motsatt side: Løft og snu overdelen på plastboksen 180°.)

Trekk kabelen innenfor breddejusteringsbuen på armlenet. Finjuster klaringen slik at spaken kan løftes ca. 2 mm før gassfjæren aktiveres. Stram deretter kontramutteren på kabelnippelen.

Kontroller funksjonen.

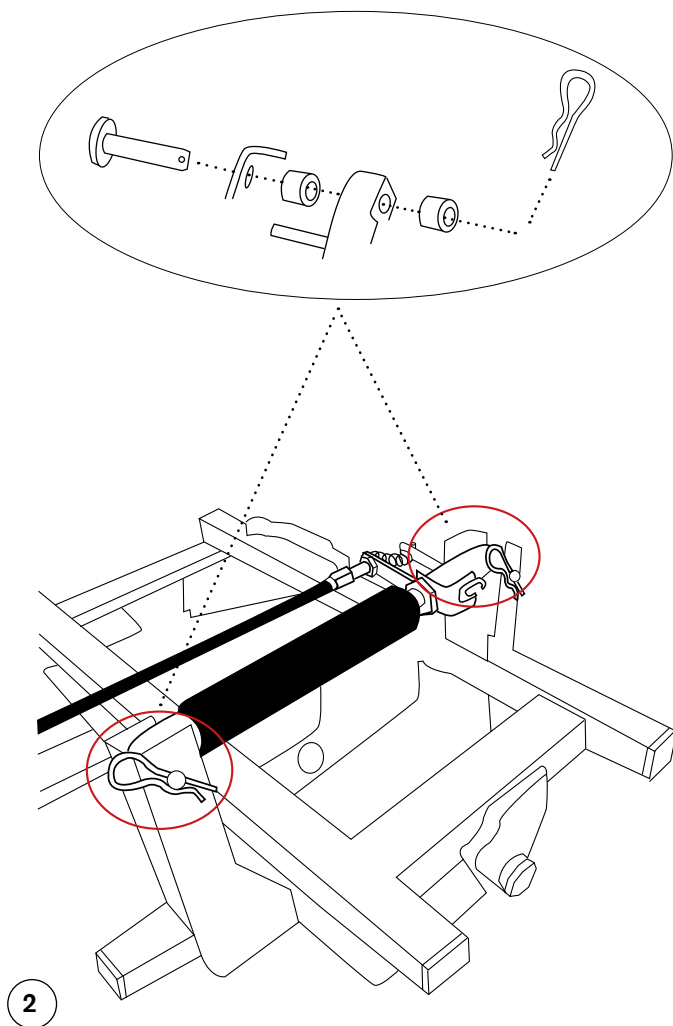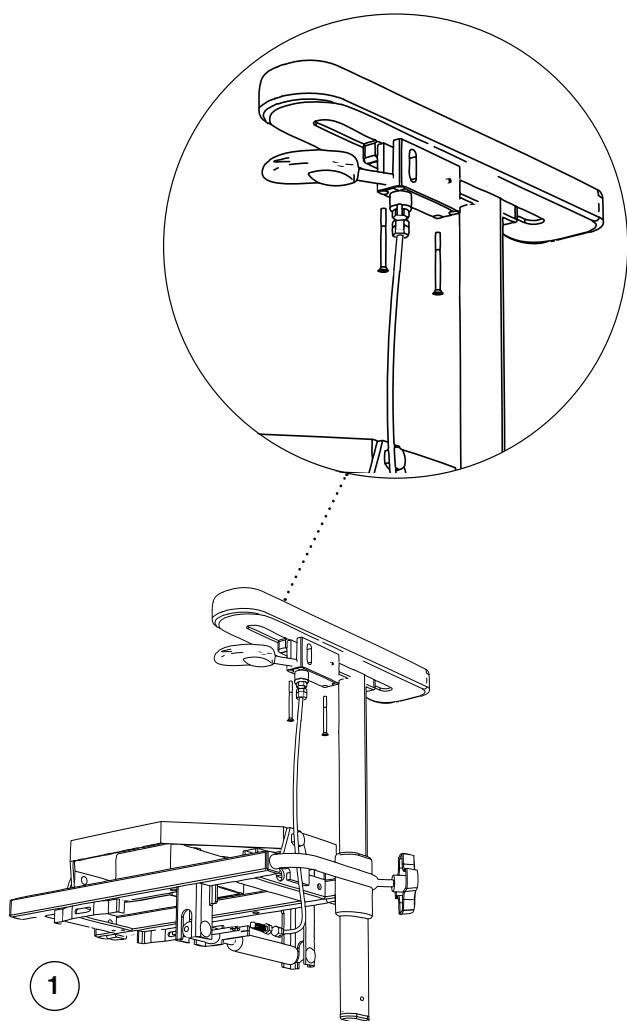

## Artikkelnummer

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| LD16   | Skrittkilefeste 115 mm kpl. u. polstrede detaljer    |
| LD17   | Skrittkilefeste 175 mm kpl. u. polstrede detaljer    |
| LD15   | Skrittkilefeste 57 mm kpl. u. polstrede detaljer     |
| LD25   | Skritt-/knedelermekanisme kpl. u. polstrede detaljer |
| LD10XX | Skrittkile liten 11 x 11                             |
| LD20XX | Skrittkile stor 15 x 15                              |

**XX-fargekoder står i prislisten og i prøveprotokollen.**

## Innhold

- 2 stk. skruer MC6S M8
- 2 stk. skruer MLC6S M6

## Nødvendig verktøy

800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)


## Utførelse

Monter festet (1) på fremkanten av sittekrysset og fest det med skruene (2) samt de to fremste av skruene som holder sitteplaten på plass.

Skyv inn det enkle magestøttefestet (dobbelt hvis både magestøtte og skrittkile brukes), og lås med låseskruene (3).

Monter skrittkile, magestøtte eller begge iht. bildet.

Juster i høyden og lås med skrue (4), og justerer i dybden og lås med skrue (3).

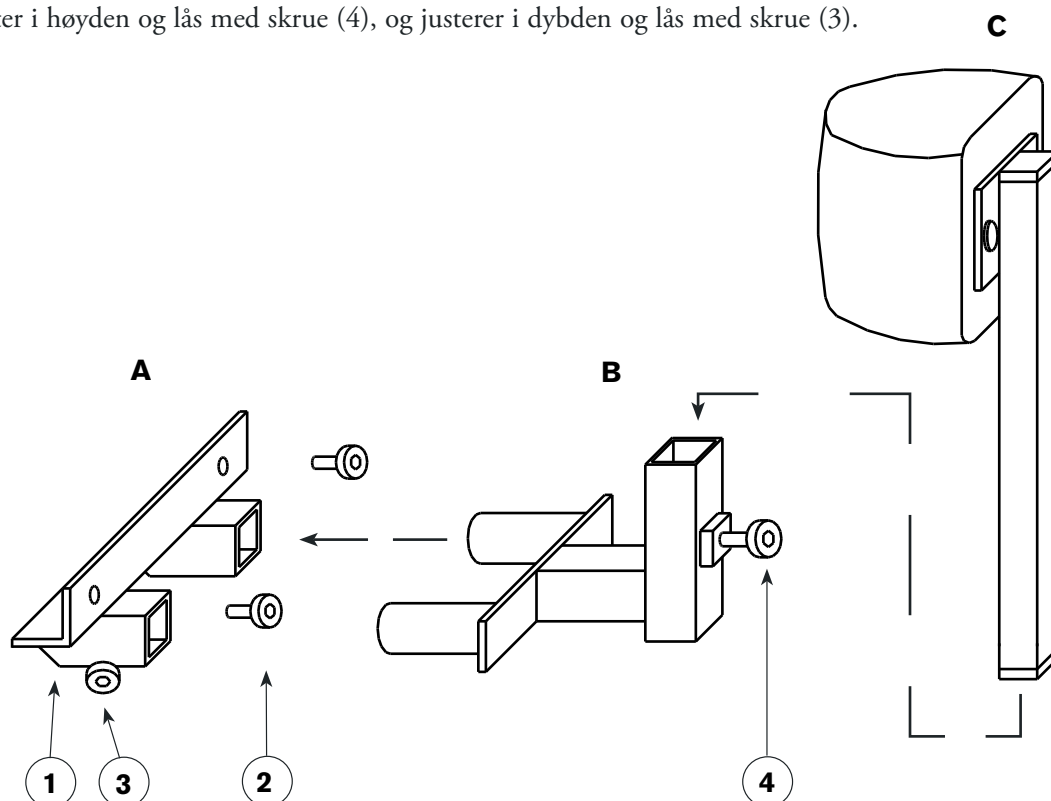

**Artikkelnummer**

802799 Bremsespakfeste til PLUS-stativ, justerbart (to stillinger)

**Nødvendig verktøy**


6 mm unbrakonøkkel

**Utførelse**

Løsne skruen (1) med en 6 mm unbrakonøkkel. Juster bremsespakfestet til valgfri bredde. Stram.

Kontroller funksjonen med brukeren i stolen.

Bremsespaken må justeres i bredden slik at avstanden mellom bremsespaken og armlenet aldri er mindre enn 25 mm i løpet av hele bremsespakens bevegelse

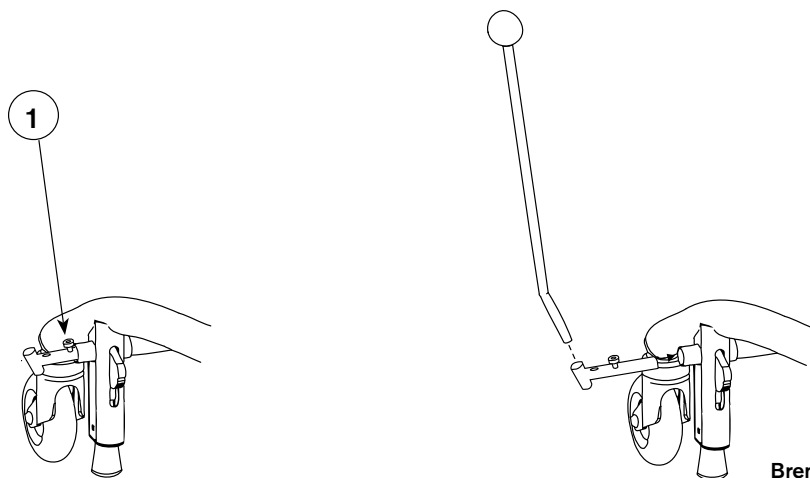

Bremsespakfeste justerbart i bredden

## Artikkelnummer

801213 lenkehjul 100 XL M12  
801144 lenkehjul 100 SL M12  
803162 lenkehjul 100 BXL M12  
800904 lenkehjul 125 mm  
800905 lenkehjul 150 mm

## Innhold

1 komplett hjul  
1 stk. M12-skrue med skive alt. 1 stk. 3/8"-skrue med skive

## Nødvendig verktøy


Ringnøkkel 18 mm alt. 19 mm alt. 9/16"  
Loctite 243

## Utførelse

Bruk fast ringnøkkel 19 mm til å fjerne det gamle hjulet.

Alternativt skrus hjulet bort med to unbrakonøkler (5 mm), og den gamle bøylen skrus løs ved hjelp av f.eks. en hylsenøkkel.

Monter deretter det nye hjulet. Boltene limes med Loctite 243 og strammes med **80–90 Nm**.

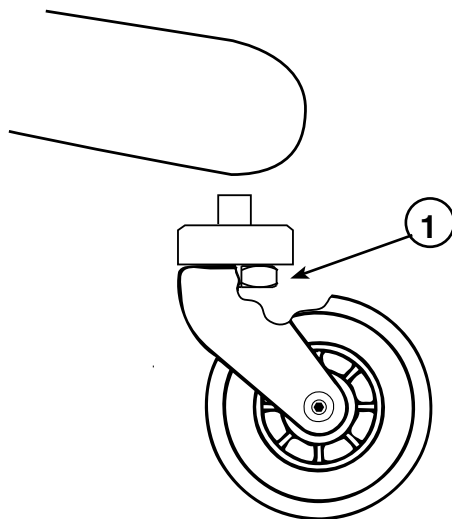

## Artikkelnummer

- HB1010 Hoftebelte S 51–71 cm inkl. fester og skruer  
HB1020 Hoftebelte M 63–83 cm inkl. fester og skruer  
HB1030 Hoftebelte L 83–103 cm inkl. fester og skruer

## Innhold

- 1 stk. hoftebelte  
2 stk. fester  
6 stk. skruer

## Nødvendig verktøy

Stjerneskrutrekker/skrutrekker


## Utførelse

Skru fast festene (2) på begge sider i de forborede hullene som er plassert under setet i de bakre hjørnene.

Fest beltet (1) i festene (2).

Spenn først beltet med borrelåslukkingen. Knepp deretter spennen til du har ønsket lengde, og stram så remmen i spennen.

Mer posisjoneringstilbehør finner du i kombinasjonsavtalen på [www.mercado.se/sv/dokument](http://www.mercado.se/sv/dokument)

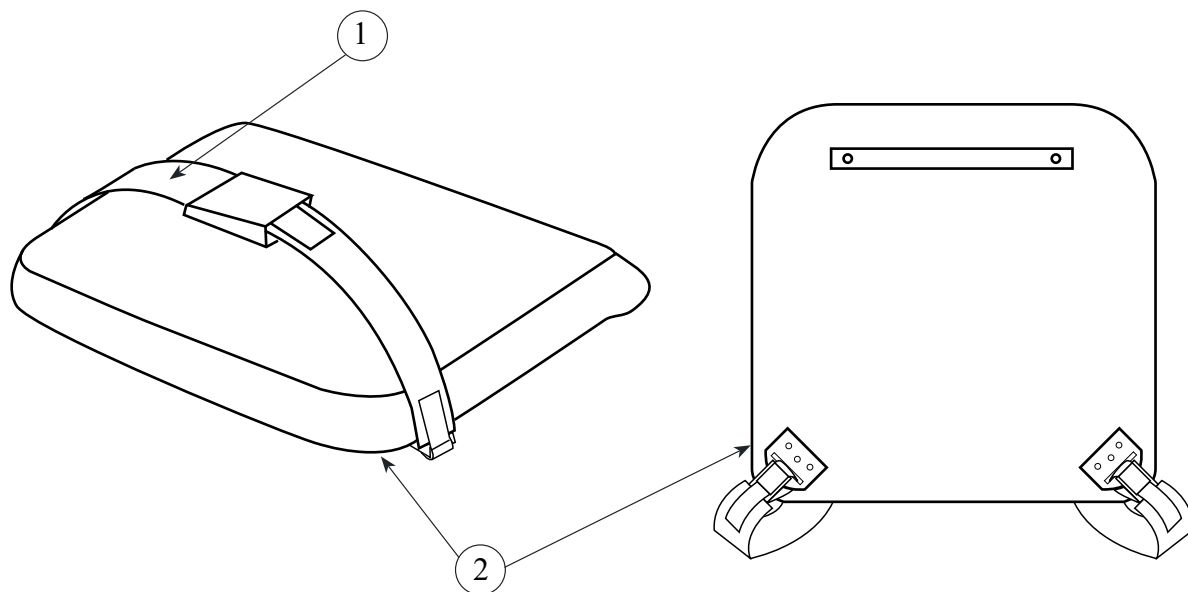



## Artikkelnummer

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| PB1011 | Kjørebøyle t. 48 PLUS-stativ |
| PB2011 | Kjørebøyle t. 43 PLUS-stativ |

## Nødvendig verktøy

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 800897 | T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen) |
|--------|-------------------------------------------------|


## Utførelse

Det nedre festet på kjørebøylen (1) skyves på bakbenet på stativet som vist.

**OBS!** Lenkehjulet trenger ikke å demonteres!

Hvis stolen er utstyrt med stativforlenger bak, monteres kjørebøylen på samme måte på stativforlengeren.

Stram skruene (2) godt med unbrakonøkkel 5 mm når kjørebøylen er i egnet stilling. Juster kjørebøylen i egnet vinkel og stram deretter skruene (3) godt med unbrakonøkkel 5 mm. Hvis stolen er utstyrt med setevinkel, justeres kjørebøylen slik at ryggstøtten går fritt i den bakre stillingen. Håndtakene stilles i egnet høyde og låses med rattet (4). Stram de to skruene (5) på kjørebøylen.

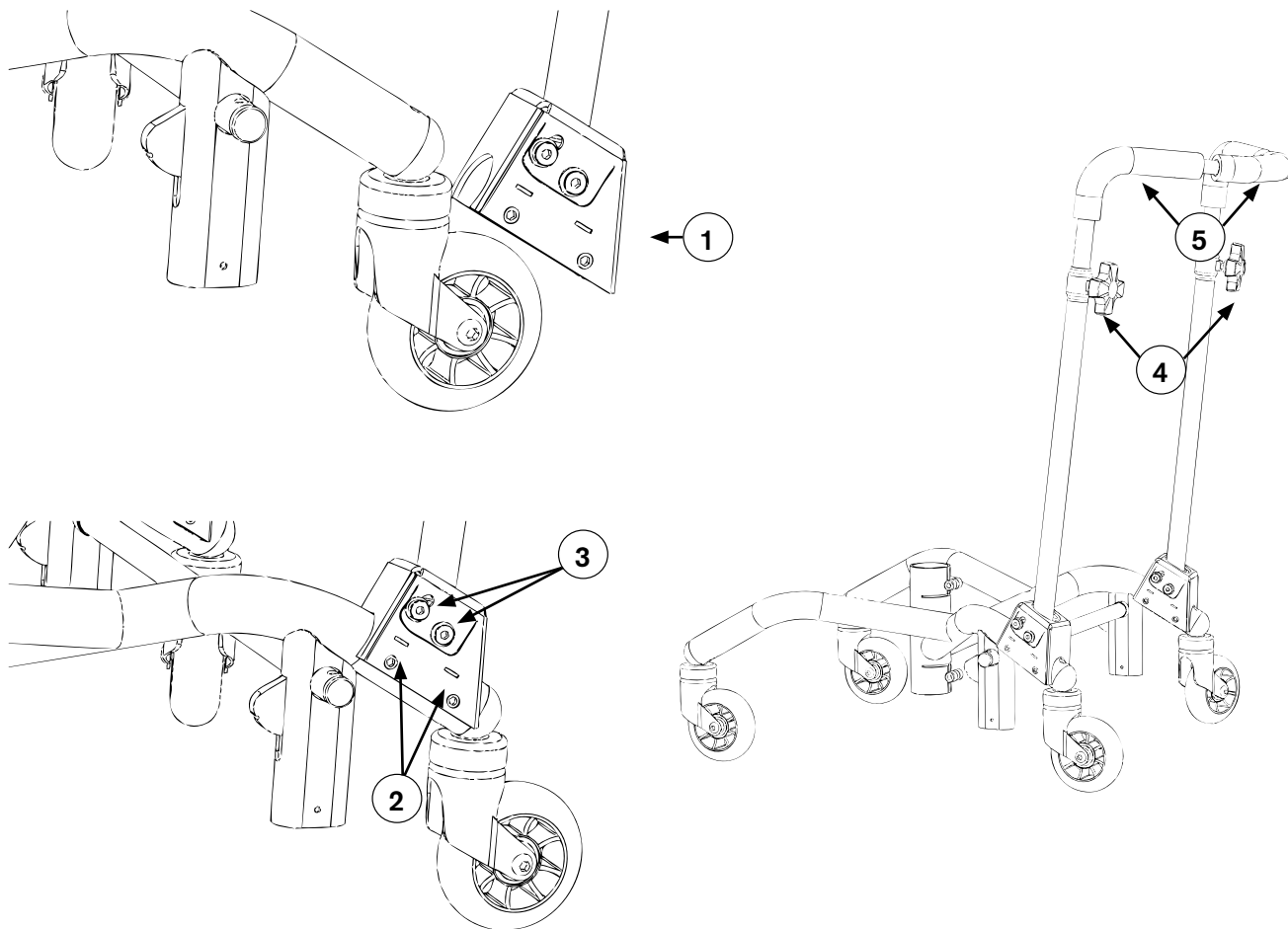

## Artikkelnummer

PB1010

Kjørehåndtak PLUS

## Nødvendig verktøy

800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)

## Utførelse


Det nedre festet på kjørehåndtaket (1) skyves på bakbenet på stativet som vist.

**OBS! Lenkehjulet trenger ikke å demonteres!**

Hvis stolen er utstyrt med stativforlenger bak, monteres kjørehåndtaket på samme måte på stativforlengeren.

Stram skruene (2) godt med unbrakonøkkel 5 mm når kjørehåndtaket er i egnet stilling. Juster kjørehåndtaket i egnet vinkel og stram deretter skruene (3) godt med unbrakonøkkel 5 mm.

Hvis stolen er utstyrt med setevinkel, justeres kjørehåndtaket slik at ryggstøtten går fritt i den bakre stillingen. Håndtakene stilles i egnet høyde og låses med rattet (4).

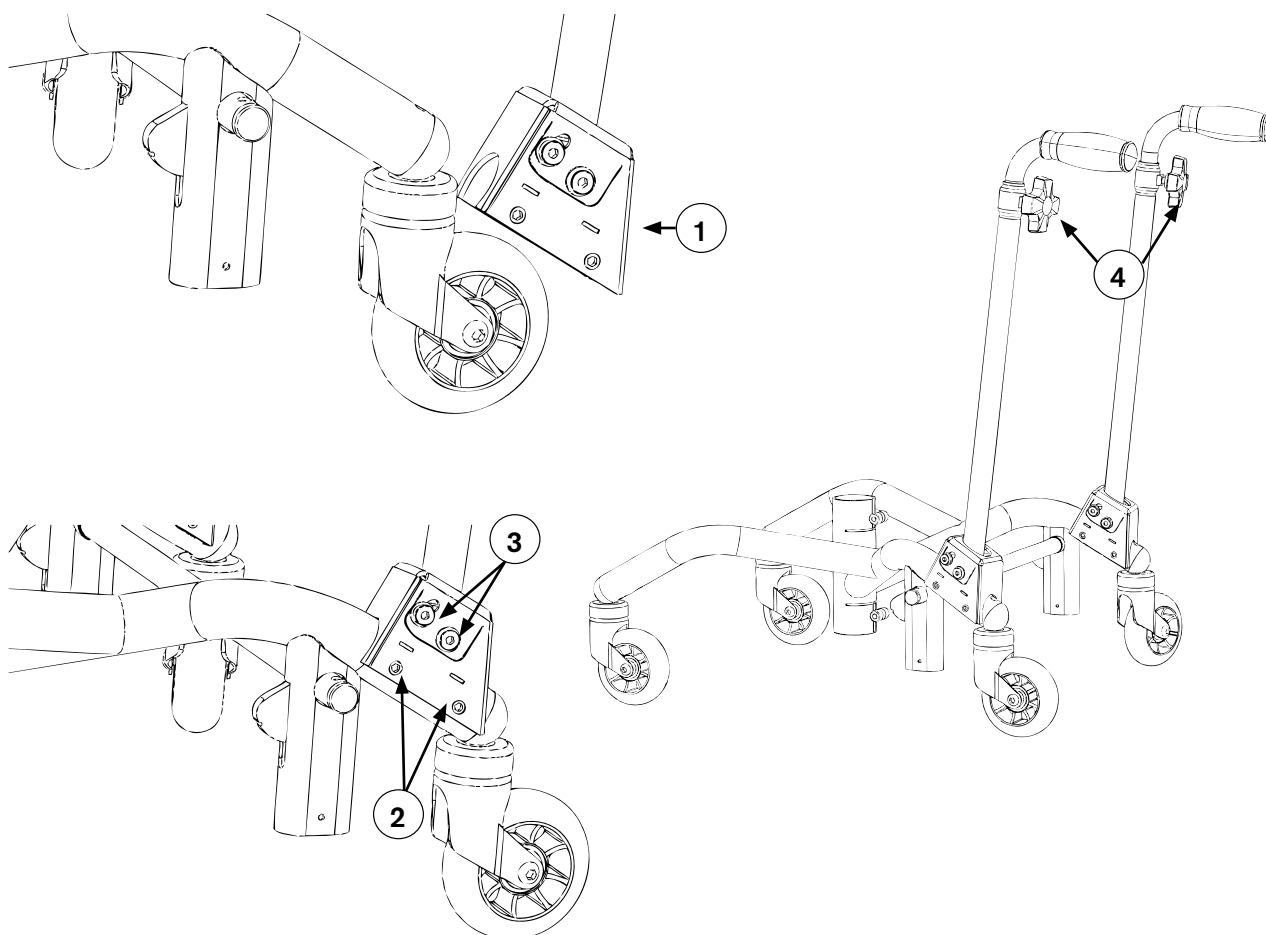

## Artikkelnummer

PB1012

Kjørehåndtak klinikk (festet under sete)

## Nødvendig verktøy

800897

T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)

## Utførelse

Snu stolen opp ned. Det enkleste er å plassere stolen med sitteplaten på et bord.



Fjern ryggstolpen (1). Demonter ryggsokkelen (2) ved å løsne de fire skruene (3). Bruk Mercados T-nøkkel. Plasser festet til kjørehåndtaket (4) på undersiden av sitteplaten.

Monter ryggsokkelen igjen (2) på festet til kjørehåndtaket (4).

Stram skruene MC65 6 x 25 (3) godt. **OBS! Bruk skruene som følger med, og ikke de opprinnelige.**

Snu stolen riktig vei igjen. Monter ryggstolpen igjen (1).

Juster kjørehåndtaket til egnet stilling ved hjelp av spakene (5). Kjørehåndtaket kan justeres i dybden og høyden. Stram godt. Sørg for at kjørehåndtaket ikke kolliderer med andre deler på stolen.

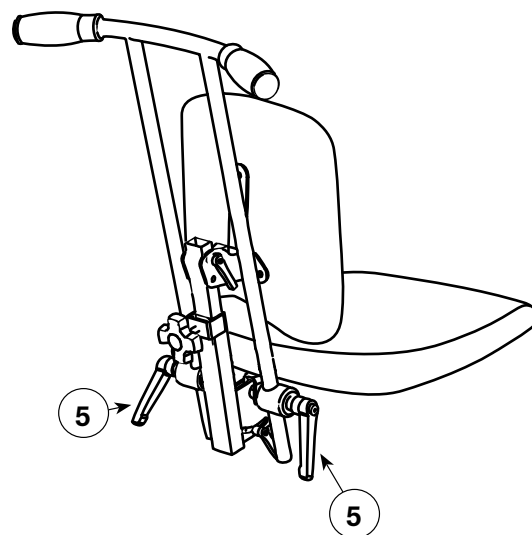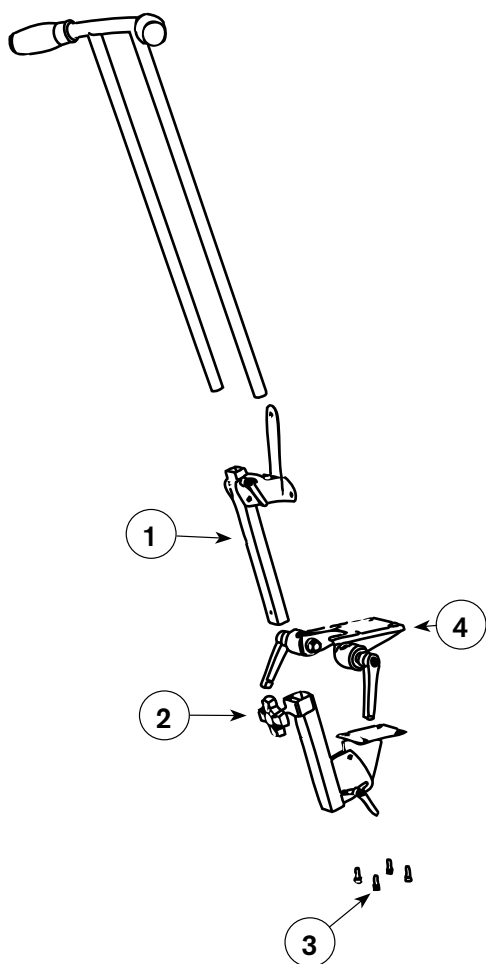

## Artikkelnummer

804491 El-liftomat 20 cm 1G

804493 El-liftomat 28 cm 1G

*(flere modeller er tilgjengelig)*

## Nødvendig verktøy

800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen) og 6 mm unbrakonøkkel

## Utførelse


Løsne skruene ved klemmetilkoblingen i stativ (1) med en 6 mm unbrakonøkkel og løft av overdelen fra stativet.

Snu overdelen opp ned. Løsne remmen til el-systemet og deretter tilkoblingene på el-systemet.

Løsne setet ved å løsne M6-skruene med en 5 mm unbrakonøkkel under sittekrysset (2). Løsne 4 stk. M8x16-skruer med en 5 mm unbrakonøkkel på overdelen av sittekrysset som er festet i el-liftomaten (3). Bytt el-liftomaten.

Skrus fast 4 stk. M8x16-skruer gjennom overdelen av sittekrysset ned i el-liftomaten (3). OBS! Bruk Loctite 243 gjengelås eller tilsvarende. Skrus fast setet med M6-skruene med en 5 mm unbrakonøkkel under sittekrysset (2). Fest remmen til el-systemet og deretter tilkoblingene til batteriet. Plasser el-systemet innenfor styrevinklene på sittekrysset. Koble stolens elektriske funksjoner til tilsvarende utganger på el-systemet. Snu overdelen og før den elektriske liftomaten ned i klemmetilkoblingen på stativet (1). Rett inn overdelen i stolens ferdigsretning og stram deretter skruene ordentlig (1) med en 6 mm unbrakonøkkel. Avstanden mellom underdelen på den elektriske liftomaten og gulvet bør være 30 mm.

Vinkeljusterbart sittekryss

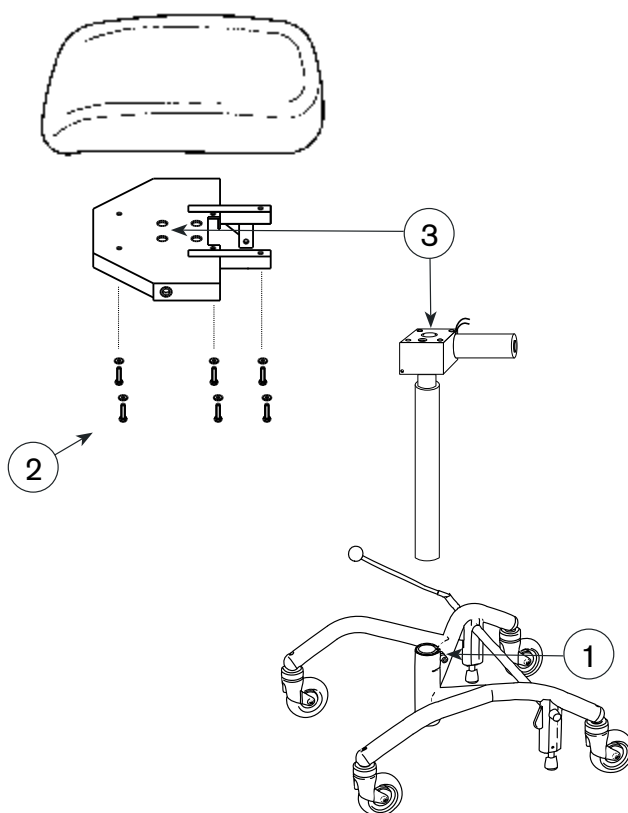

## Nødvendig verktøy


800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)

## Utførelse

Når du skal montere en ny rygg-/mageplate, må du skru ut skruene (1) på baksiden av rygg-/mageplaten (tre skruer på høy ryggplate og to skruer på lav rygg-/mageplate) med Mercado-nøkkelen. Monter deretter den nye rygg-/mageplaten og skru til skruene igjen.

Høy ryggplate

Lav rygg-/mageplate

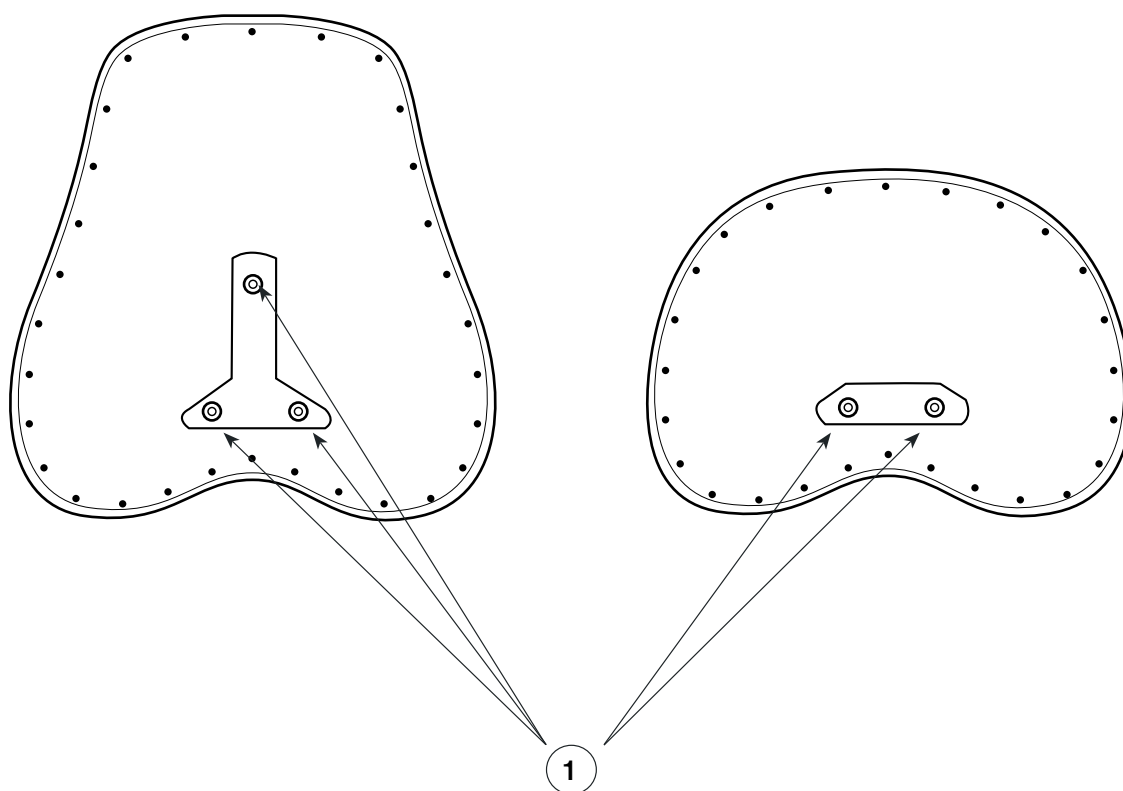

**Artikkelnummer**

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 802874                                                 | Sidestøtte feste PLUS h. + v. kpl. |
| SS40XX                                                 | Sidestøttepute L 30 x 16 cm        |
| SS30XX                                                 | Sidestøttepute M 25 x 14 cm        |
| SS20XX                                                 | Sidestøttepute S 28 x 8 cm         |
| SS10XX                                                 | Sidestøttepute XS 15 x 8 cm        |
| XX-fargekoder står i prislisten og i prøveprotokollen. |                                    |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| SS11 | Sidestøtte PLUS feste h. |
| SS12 | Sidestøtte PLUS feste v. |


**Nødvendig verktøy**

800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)

**Utførelse**

Løsne rattet (3). Løft ut høydejusteringsrøret til armlenet, og trø på mekanikken til sidestøttefestet (4) på høydejusteringsrøret. Mekanikken (4) kan vendes fremover eller bakover på høydejusteringsrøret for å oppnå forskjellig justering i dybden, og beslaget på sidestøtteputen kan vendes for ytterligere justering i dybden.

Høyden og vinkelen på sidestøtten justeres med skrue (1).  
Putens vinkel i dybden samt bredden justeres med skrue (2).

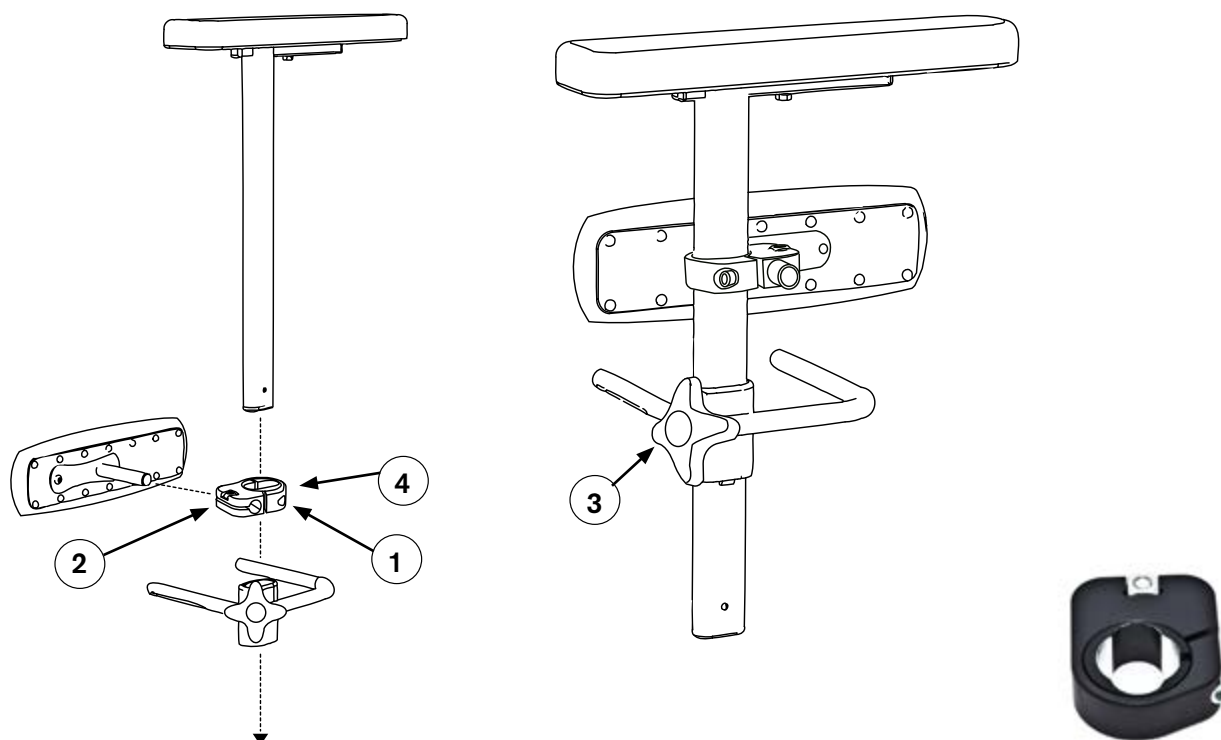

## Nødvendig verktøy


800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)

## Utførelse


Når du skal montere sitteplaten på sittekrysset, strammer du skruene med en 5 mm unbrakonøkkel gjennom rammen på sittekrysset iht. bildet nedenfor. Seter med en setedybde på 39 cm og mindre har siden 01.04.2012 to mulige posisjoner med 5 cm intervaller. Dette for at det skal kunne monteres eventuell benstøtte som bygger på sittekrysset foran.

Vinkeljusterbart sittekryss monteres med seks skruer. Vinkelfast sittekryss monteres med fire skruer.


Vinkeljusterbart sittekryss

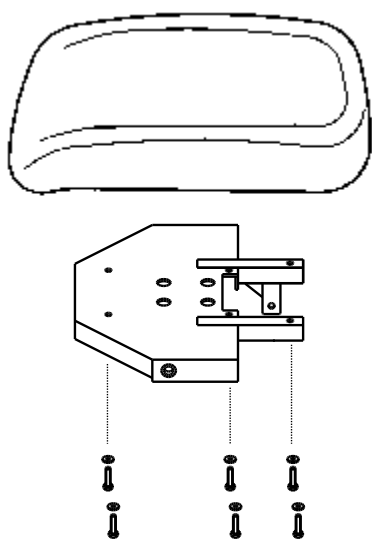

Sitteskryss REAL 2000

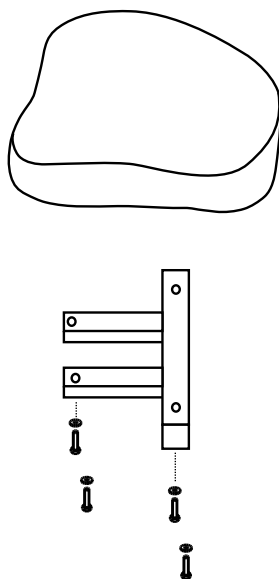

Vinkelfast sittekryss

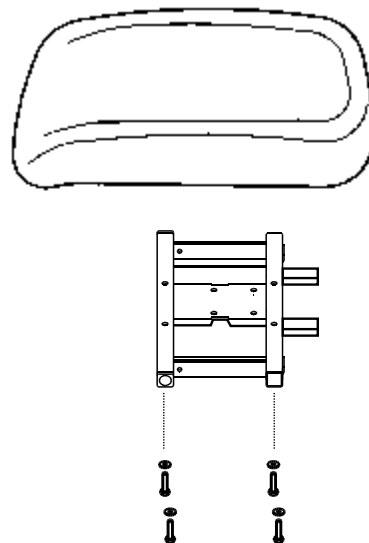

## Artikkelnummer

LS109001 Benstøttefeste Medic  $\geq 43$  dy. sete (1)LS109002 Benstøttefeste Medic  $\leq 40$  dy. sete (7)

LS151310 Benstøtte Medic delt L 28–41 cm

LS151110 Benstøtte Medic delt S 18–24 cm

CS1038 Leggstøttepute 15 x 13 cm t. B37

LS161310 Benstøtte Mini Medic delt L h. + v. 28–41 cm

LS111410 Benstøtte Mini Medic hel XL 38–51 cm

LS151210 Benstøtte Medic delt M 23–32 cm

LS151410 Benstøtte Medic delt XL 38–51 cm

802214 Leggstøttemekanisme kpl. Medic benstøtte B37

## Innhold

1 stk. benstøttefeste 1 stk. sett med nødvendige skruer, muttere og skiver / innsatsmuttere til tre

## Nødvendig verktøy

Unbrakonøkkel 5 alt. 6 mm

Ringnøkkel 13 mm

800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)

## Utførelse

Monter benstøttefestet (1) alt. (7) med to M8-skruer gjennom hullene (2) på festet og gjennom motsvarende hull på fremsiden av sittekrysset (3). Merk at dersom stolen er vinkeljusterbar, monteres festet i øvre del av sittekrysset (3). Hvis stolen ikke er vinkeljusterbar, monteres festet i sittekrysset (4).

Lås med låsemutter. Det må brukes skiver på begge sider.


Fest benstøttefestet til stort sete (1) slik: Mål med benstøttefestet (1) og marker hullene i sitteplaten.

Bor 10 mm hull gjennom sitteplaten. Monter deretter de medfølgende innsatsmutterne. Skru fast benstøttefestet (1) ved å sette skruer i hullene (5).

Juster lengden på benstøtten med skrue (8) ved hjelp av en T-nøkkel slik at låret hviler mot fremkanten av setet. Lås. Still deretter inn rett vinkel på benstøtten ved å løsne låseskruen (9) med en T-nøkkel. Når du har stilt inn rett vinkel, strammer du låseskruen (9). Juster eventuelt fotplaten i vinkel slik at foten får avlastning på hele fotplaten uten å gli av.

Medic-benstøtten monteres deretter i åpningene (6). Ring (8) må løsnes (OBS! to skruer). Ved montering av leggstøttefestet (10) må ringen monteres igjen (8). Monter akselen (11) i leggstøttefestet. Løsne deretter skruene (12) på putefestet, og monter det på akselen (11). Stram.

Juster leggplaten i dybden og høyden ved å vri på akselen i festet (10). Juster puten for å gi størst mulig avlastningsflate.

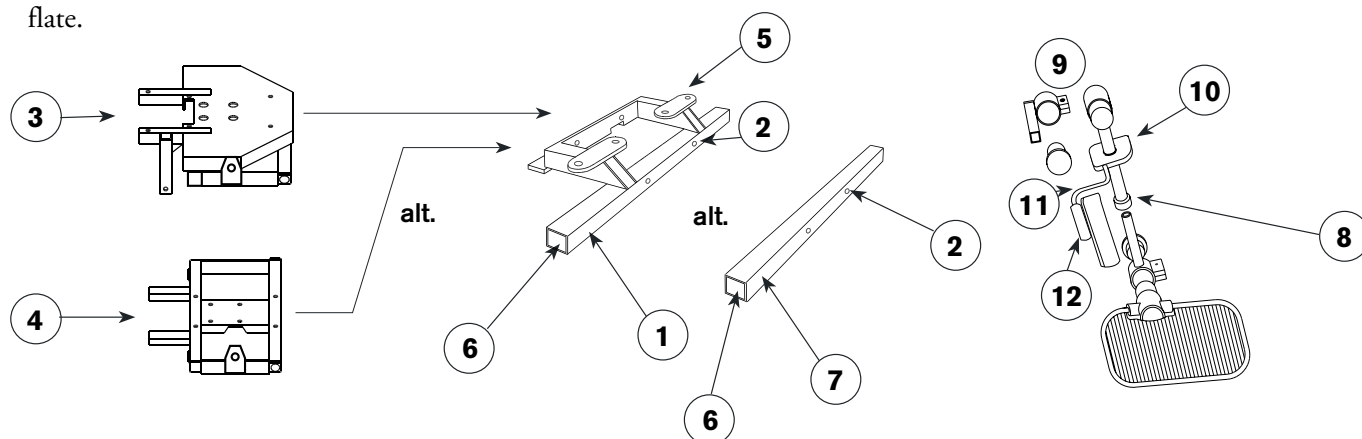



## Artikkelnummer

802216 Leggstøttemekanisme kpl. Mobil benstøtte B32


## Nødvendig verktøy

800897 T-nøkkel 5 mm unbrakoverktøy (Mercado-nøkkelen)

## Utførelse

1. Fest ringen (1) på venstre eller høyre benstøtte (5).
2. Fest buen (2) i festet (1).
3. Skru fast festet (3) på leggstøtteputen (4).
4. Monter leggstøtteputen med feste på buen (2).
5. Monter leggstøttemekanismen på benstøtten.

Juster leggstøtten i høyden/dybden ved å justere ringen (1) i høyden og buen (2) i rotasjon, og stram deretter i ønsket posisjon.

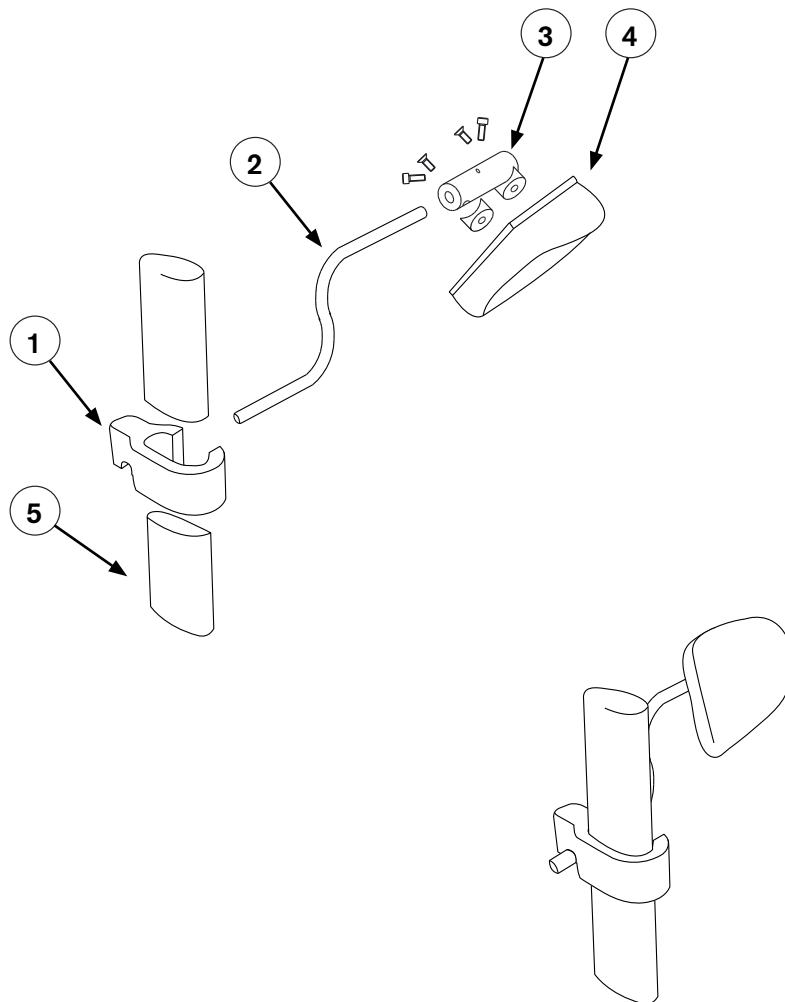

## Artikkelnummer

STCXXXXXX Overtrekk til sete

## Forklaring

X-en i artikkelnummeret står for forskjellige tallkoder. De to første X-ene utgjør modell på overtrekket, de to mellomste utgjør størrelsen, og de to siste utgjør materiale og farge.

Modeller STCXXXXXX

10: ErgoMedic 11: ErgoMedic Slow Recovery 20: ErgoMedic PLUS 21: ErgoMedic PLUS Slow Recovery

Størrelser STCXXXXXX

Voksen: 10: 48 x 48 15: 44 x 48 20: 44 x 43 25: 40 x 48

Universal: 30: 40 x 43

Barn: 35: 40 x 39 40: 36 x 43 45: 36 x 39 50: 33 x 35 55: 29 x 32

Materiale/farge STCXXXXXX*Plysj:*

41: Burgunderød 42: Brun 44: Marineblå 45: Kongeblå 46: Grå 48: Svart

*Øvrige materiale:*

66: Inkontinens 73: Bomullsstoff, barn, gult 74: Bomullsstoff, barn, blått 75: Stoff, voksen blått

81: Stoff, barn, rødt 85: Stoff, barn, blått 89: Stoff, barn, gult

## Utførelse

Trekk overtrekket over den polstrede detaljen. Ved inkontinensovertrekk skal plysjen vendes ut.

Merk at lappen med størrelse og vedlikeholdsanvisning plasseres over setets bakkant.

Vær nøye med at sømmen på overtrekket er trukket jevnt over kanten på setet.

Det finnes overtrekk til alle polstrede detaljer.

Se [www.mercado.se](http://www.mercado.se) eller kontakt Mercado hvis du vil ha mer informasjon om overtrekk til polstrede detaljer.



## Artikkelnummer

BRCXXXXXX Overtrekk til rygg

## Forklaring

X-en i artikkelnummeret står for forskjellige tallkoder. De to første X-ene utgjør modell på overtrekket, de to mellomste utgjør størrelsen, og de to siste utgjør materiale og farge.

Modeller BRCXXXXXX

|                           |                                         |                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 10: Basker                | 11: Basker Slow Recovery                | 12: ErgoMedic                      |
| 20: ErgoMedic PLUS Basker | 22: ErgoMedic PLUS Slow Recovery Basker | 25: ErgoMedic PLUS sidekile Basker |

Størrelser BRCXXXXXX

|             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10: 46 x 43 | 15: 42 x 43 | 25: 33 x 36 | 30: 40 x 34 | 35: 30 x 34 | 45: 27 x 32 | 50: 23 x 27 |
| 55: 38 x 26 | 60: 33 x 26 | 65: 30 x 26 | 70: 27 x 22 | 85: 23 x 20 | 90: 33 x 16 |             |

Materiale/farge BRCXXXXXX**Plysj:**

|                  |          |               |              |         |           |
|------------------|----------|---------------|--------------|---------|-----------|
| 41: Burgunderrød | 42: Brun | 44: Marineblå | 45: Kongeblå | 46: Grå | 48: Svart |
|------------------|----------|---------------|--------------|---------|-----------|

**Øvrige materiale:**


|                       |                              |                               |                         |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 66: Inkontinens       | 73: Bomullsstoff, barn, gult | 74: Bomullsstoff, barn, blått | 75: Stoff, voksen blått |
| 81: Stoff, barn, rødt | 85: Stoff, barn, blått       | 89: Stoff, barn, gult         |                         |

## Utførelse

Dra overtrekket over den polstrede detaljen. Ved frotté med plast skal frottématerialet vendes ut. Merk at lappen med størrelse og vedlikeholdsanvisning plasseres over ryggens bakkant. Vær nøye med at sømmen på overtrekket er trukket jevnt over kanten på ryggen. Fest overtrekket med de to borrelåsfestene (1).

Overtrekkene er formsydd til de ulike polstrede detaljene og variantene.

Se [www.mercado.se](http://www.mercado.se) eller kontakt Mercado hvis du vil ha mer informasjon om overtrekk til polstrede detaljer.

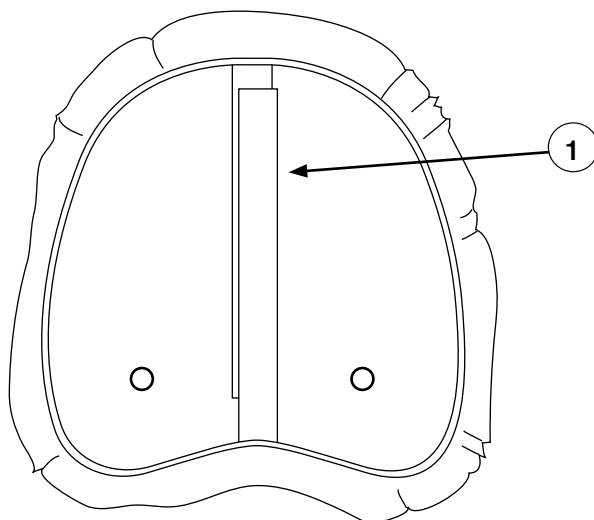

**Artikkelnummer**

STCXXX66 Overtrekk til sete, inkontinens, plysj, grått

**Forklaring**

X-en i artikkelnummeret står for forskjellige tallkoder. De to første X-ene utgjør modellen på overtrekket, og de siste to utgjør størrelsen på overtrekket.

Modeller STCXXX66

10: ErgoMedic 11: ErgoMedic Slow Recovery 20: ErgoMedic PLUS 21: ErgoMedic PLUS Slow Recovery

Størrelser STCXXX66

Voksen: 10: 48 x 48 15: 44 x 48 20: 44 x 43 25: 40 x 48

Universal: 30: 40 x 43

Barn: 35: 40 x 39 40: 36 x 43 45: 36 x 39 50: 33 x 35 55: 29 x 32

**Utførelse**

Dra overtrekket over den polstrede detaljen. Ved frotté med plast skal frottématerialet vendes ut. Merk at lappen med størrelse og vedlikeholdsanvisning plasseres over setets bakkant. Vær nøye med at sømmen på overtrekket er trukket jevnt over kanten på setet.

Det finnes overtrekk til alle polstrede detaljer. Se [www.mercado.se](http://www.mercado.se) eller kontakt Mercado hvis du vil ha mer informasjon om overtrekk til polstrede detaljer.





# BOLSTØTTE



TS31



TS2038



TS312038

[illegible]

## PASSER TIL FØLGENDE MODELLER

[illegible]

## BRUKSANVISNING

Slik stiller du inn og justerer sving- og justerbar bolstøtte:

1. Start med å løsne skruen (1) ved hjelp av en unbrakonøkkel (5 mm). Still deretter inn den låste startposisjonen på bolstøtten. Stram så skruen (1) igjen.
2. Når det første trinnet er gjennomført, er bolstøttemekanismen låst i den stillingen den er stilt inn på. Når du vil svinge ut bolstøtten, trekker du ned plastknotten som sitter under skruen (1). Dette låser opp låsen, noe som gjør at bolstøtten kan svinges fritt til plastknotten slippes igjen. Da låses bolstøtten når den havner i startstillingen igjen.
3. Når du skal stille inn høyden på bolstøtten, løsner du skruen (3) ved hjelp av en unbrakonøkkel (5 mm). Still deretter inn ønsket høyde på bolstøtten. Stram deretter skruen (3) igjen. Utfør dette trinnet mens bolstøtten svinger fritt, da den kan komme borti siden på ryggen om den stilles nedover i låst stilling.
4. Når du skal stille inn dybden på bolstøtten, løsner du skruen (4) ved hjelp av en unbrakonøkkel (5 mm). Still deretter inn ønsket dybde på bolstøtteputen. Stram så skruen (4) igjen.



## MONTERINGSANVISNING

### KLARGJORT RYGGPLATE



1 x **TS31**  
*bolstøttemekanisme sving-  
og justerbar, høyre*



1 x **TS32**  
*bolstøttemekanisme sving-  
og justerbar, venstre*



4 x **803771**  
*unbrakoskrue M6x30*

Start med å undersøke om nettopp din ryggplate er klargjort for sving- og justerbar bolstøtte. Dette gjør du enklest ved å trykke tommelen mot stoffet nederst på baksiden på valgfri side. Trekk deretter tommelen opp langs siden av ryggen ca. 1 cm innenfor naglene. På en klargjort rygg kommer du til å kjenne to hull på hver side med 20 cm mellomrom i høyden.

## Klargjort ryggplate:

1. Start med å åpne opp stoffet over de klargjorte gjengene. Dette gjøres lettest ved hjelp av en teppekniv. Merk at åpningen ikke trenger å være altfor stor. Det holder som regel å skjære et lite kryss i stoffet.
2. Plasser bolstøttemekanismen (TS31) på ryggen, og fest deretter et av festene med en M6x30 unbrakoskrue (803771).
3. Juster bolstøttemekanismen (TS31) slik at det andre festet tangerer den andre klargjorte gjengen. Fest det deretter på samme måte som i det tidligere trinnet.

Stram unbrakoskruen M6x30 (803771) uten å legge trykk mot ryggen, slik at bolstøttemekanismen (TS31) sitter fast og ikke kan vrikkes eller flyttes.

Gjenta disse fire trinnene på den andre siden av ryggplaten for å feste den andre bolstøttemekanismen (TS32 for venstre side).

1



2



3



## IKKE KLARGJORT RYGGPLATE



**1 x TS31**  
bolstøttemekanisme  
sving- og justerbar,  
høyre



**1 x TS32**  
bolstøttemekanisme  
sving- og justerbar,  
venstre



**4 x 803771**  
unbrakoskrue  
M6x30



**4 x 804101**  
innsatsgjenge  
M6x4,8

1. Start med å plassere bolstøttemekanismen (TS31) i ønsket utgangsstilling.

1





## forts. MONTERINGSANVISNING

2. Lag deretter et hull i stoffet og ryggplaten med et 6 mm bor. Dette gjør du lettest og mest nøyaktig ved å bore hull gjennom hullet i festet som allerede er plassert i riktig stilling på ryggplaten.

3. Flytt bolstøttemekanismen (TS31) bort fra ryggplaten og børst eller blås bort trespon.

4. Åpne opp det nye hullet med et 9,5 mm bor. Børst eller blås bort trespon.

5. Plasser en innsatsgjenge (804101) i hullet du har boret.


6. Trekk til innsatsgjengen (804101) med en 6 mm unbrakonøkkel. Trekk den til så den er ca. 1 mm under treoverflaten på ryggplaten.

7. Plasser bolstøttemekanismen (TS31) på ryggen, og fest deretter et av festene med en M6x30 unbrakoskrue (803771).

8. Juster bolstøttemekanismen (TS31) slik at den er riktig plassert med den ene unbrakoskruen (803771) festet.

Gjenta nå trinn 2 til og med 7 på det andre festet i bolstøttemekanismen (TS31).

9. Trekk til begge unbrakoskruene (803771) slik at bolstøttemekanismen (TS31) er godt festet. Gjenta disse ni trinnene på den andre siden av ryggen for å feste den andre bolstøttemekanismen (TS32 for venstre side av ryggen).

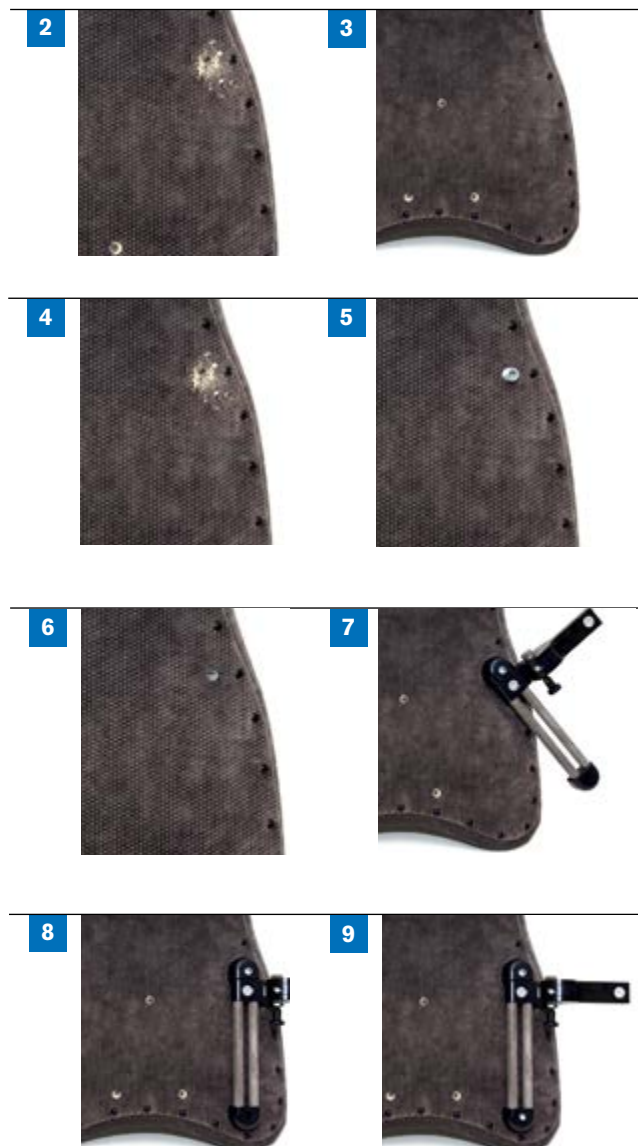

### Montering av bolstøttepute

Stram låseskruen for å låse puten på plass (se bilde for detalj av låsefelt).



## DESTRUERINGSANVISNING

**BOLSTØTTEMEKANISME**

– sorteres som *stål*





# FESTING AV H-SELE

804184

[illegible]

## PASSER TIL FØLGENDE MODELLER

|        |               |                                                        |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------|
|        | REAL 9000P    | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS VOKSEN MANUELL maks. 140 kg |
|        | REAL 9100P    | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS VOKSEN EL maks. 150 kg      |
|        | REAL 9300P    | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS BARN MANUELL maks. 75 kg    |
|        | REAL 9300PM   | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS MINI MANUELL maks. 50 kg    |
|        | REAL 9400P    | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS BARN EL maks. 75 kg         |
|        | REAL 9400PM   | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS MINI EL maks. 50 kg         |
|        | REAL 9700P    | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS COXIT MANUELL maks. 140 kg  |
|        | REAL 9800P    | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS COXIT EL maks. 150 kg       |
|        | REAL 6100     | Elektrisk rullestol innendørsbruk                      |
|        | REAL 6100 PB  | Elektrisk rullestol innendørsbruk PLUS BARN            |
|        | REAL 6100 PV  | Elektrisk rullestol innendørsbruk PLUS VOKSEN          |
| # CBXX | DOK.CBXX.1409 | 01.09.2014                                             |

# MONTERINGSANVISNING

1. Demonter det øvre festet til H-selen slik at alle komponentene er tatt fra hverandre.

2. Plasser festet til mekanismen (G) i ønsket utgangsstilling.

3. Til klargjøring av innsatsgjengene (D) borer du et hull med et 6 mm bor. Det letteste er å bore rett ned gjennom det øverste hullet i festet til mekanismen (G).

4. Fjern festet og åpne hullet med et 9,5 mm bor. Stram deretter en innsatsgjenge (D) med en 6 mm unbrakonøkkel. Trekk den til så den er ca. 1 mm under treoverflaten på ryggplaten i det åpnete hullet.

5. Plasser nå festet (G) over innsatsgjengen (D) og stram den øvre skruen (A) ved hjelp av en 5 mm unbrakonøkkel (Mercado-nøkkelen). Still inn festet til mekanismen (G) slik du ønsker.

1



2




3



4



5

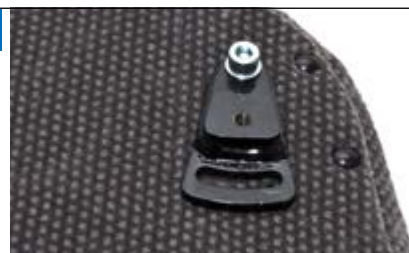

## MONTERINGSANVISNING


6. Bruk nå et 6 mm bor til å lage et hull til i det nedre sporet i festet til mekanismen (G).

6



7. Ta av festet til mekanismen (G). Gjenta trinnene unner punkt 4. Resultatet bør se ut som på bildet ved siden av.

7

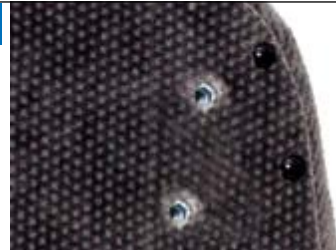

8. Plasser festet til mekanismen (G) over innsatsgjengene (D) og stram det med skruen (B) ved hjelp av en 5 mm unbrakonøkkel (Mercado-nøkkelen) i den nedre innsatsgjengen (D).

8



9. Plasser nå festet til H-selen (F) over festet til mekanismen (G).

9



10. Plasser nå skiven til mekanismen (E) oppå festet til H-selen (F).

10



11. Plasser skrue (A) i den øvre innsatsgjengen (D) slik at den går gjennom hullet i festet til mekanismen (G) og skiven til mekanismen (E) samt i sporet i festet til H-selen (F). Plasser skrue (C) i hullet nedenfor skrue (A). Stram deretter begge skruene (A, B) med en 5 mm unbrakonøkkel (Mercado-nøkkelen).

11



## forts. MONTERINGSANVISNING

Gjenta punkt 1–11 på motsatt side av ryggen.  
Resultatet bør se ut som på bildet ved siden av.



## DESTRUERINGSANVISNING

**FESTE TIL H-SELE**

– sorteres som *stål*



# HÅNDBREMSSPAKER

BD1020



BD1010



BD1030



BD1040



ART. NR.

BESKRIVELSE

BD1020

25 cm med låseskrue

BD1010

35 cm

BD1030

45 cm

BD1040

55 cm

## PASSER TIL FØLGENDE MODELLER

REAL 9000P

Arbeidsstol REAL 9000 PLUS VOKSEN MANUELL maks. 140 kg

REAL 9100P

Arbeidsstol REAL 9000 PLUS VOKSEN EL maks. 150 kg

REAL 9300P

Arbeidsstol REAL 9000 PLUS BARN MANUELL maks. 75 kg

REAL 9300PM

Arbeidsstol REAL 9000 PLUS MINI MANUELL maks. 50 kg

REAL 9400P

Arbeidsstol REAL 9000 PLUS BARN EL maks. 75 kg

REAL 9400PM

Arbeidsstol REAL 9000 PLUS MINI EL maks. 50 kg

REAL 9700P

Arbeidsstol REAL 9000 PLUS COXIT MANUELL maks. 140 kg

REAL 9800P

Arbeidsstol REAL 9000 PLUS COXIT EL maks. 150 kg

## BRUKSANVISNING

Brems stolen ved å skyve håndbremsspaken fremover. Hvis stativet har omvendt brems (gjelder 48-stativet) eller er av typen 43 x 53 / 43 x 48, bremses du i stedet ved å dra håndbremsspaken bakover.

# BDX

DOK.BDX.1404

03.04.2014



# MONTERINGSANVISNING

1. Lengst bak på hver side av stativet finner du et feste til håndbremsspaken.

2. Ta håndbremsspaken og hold den i kulen. Plasser deretter den smalere nedre delen i håndbremsspakfestet.

Festene til håndbremsspaken kan også justeres i lengden ved behov:

3. Løsne skruen som låser håndbremsspakfestet.

4. Stram eller skyv ut håndbremsspakfestet til ønsket bredde.

5. Fest håndbremsspakfestet ved hjelp av skruen du løsnet i trinn 1.

1



2



3



4



5



Håndbremsspakfestet finnes i to modeller – standardmodellen med to låsestillinger (802799) og en modell med økt breddejustering med sju låsestillinger (802800).



802799



802800

Håndbremsspakene har utskiftbare kuler for bedre grep. Kulene kommer i fem modeller:

Liten kule, rød, 35 mm (LB1020)

Stor kule, rød, 50 mm (LB1030)

Liten kule, svart, 35 mm (LB1000)

Stor kule, svart, 50 mm (LB1010)

Liten kule, gummi, svart, 40 mm (LB1040)



LB1020



LB1030



LB1000



LB1010



LB1040

## DESTRUERINGSANVISNING

HÅNDBREMSSPAKER

- sorteres som *stål*

KULE

- sorteres som *brennbart materiale*



# NAKKESTØTTE

| NS10, NS20, NS30                                                                  | NS11-31                                                                           | NS1046                                                                             | NS2046                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                   |  |  |

| ART. NR. | BESKRIVELSE                                        |
|----------|----------------------------------------------------|
| NS10     | Nakkestøttemekanisme L, h = 48                     |
| NS20     | Nakkestøttemekanisme M, h = 38                     |
| NS30     | Nakkestøttemekanisme S, h = 28                     |
| NS11     | Nakkestøttemekanisme L, h = 48, sidejusterbar kpl. |
| NS21     | Nakkestøttemekanisme M, h = 38, sidejusterbar kpl. |
| NS31     | Nakkestøttemekanisme S, h = 28, sidejusterbar kpl. |
|          |                                                    |
| NS1046   | Nakkestøttepute, rett 29 x 16, plysj, grå          |
| NS2046   | Nakkestøttepute EM PLUS 30 x 23, plysj, grå        |
| NS3046   | Nakkestøttepute buet 31 x 18, plysj, grå           |
| NS4046   | Nakkestøttepute EM PLUS 30 x 8, plysj, grå         |
|          |                                                    |
|          |                                                    |

## PASSER TIL FØLGENDE MODELLER

|        |                 |                                                        |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|
|        | REAL MOBIL 6100 | Elektrisk rullestol innendørsbruk                      |
|        | REAL 6160PB     | Elektrisk rullestol innendørsbruk PLUS BARN            |
|        | REAL 6160PV     | Elektrisk rullestol innendørsbruk PLUS VOKSEN          |
|        | REAL 9000       | Arbeidsstol REAL 9000                                  |
|        | REAL 9000P      | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS VOKSEN MANUELL maks. 140 kg |
|        | REAL 9100P      | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS VOKSEN EL maks. 150 kg      |
|        | REAL 9300P      | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS BARN MANUELL maks. 75 kg    |
|        | REAL 9300PM     | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS MINI MANUELL maks. 50 kg    |
|        | REAL 9400P      | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS BARN EL maks. 75 kg         |
|        | REAL 9400PM     | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS MINI EL maks. 50 kg         |
|        | REAL 9700P      | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS COXIT MANUELL maks. 140 kg  |
|        | REAL 9800P      | Arbeidsstol REAL 9000 PLUS COXIT EL maks. 150 kg       |
| # NSXX | DOK.NSXX.1310   | 01.10.2013                                             |



Når du skal justere vinkelen på nakkestøtteputen, løsner du vrideren (1) og stiller inn puten i ønsket vinkel.

Stram vrideren (1) for å låse puten i ønsket stilling.

Når du skal justere dybden på nakkestøtteputen, løsner du vrideren (3) og skyver nakkestøtten frem eller trekker den tilbake og låser den ved å stramme vrideren (3).

Når du skal justere nakkestøtten i siden (bare mulig på NS11, NS21 og NS31), løsner du vrideren (4) og skyver nakkestøtten til ønsket stilling. Stram deretter vrideren (4) for å låse mekanismen.

Når du skal justere høyden på nakkestøtten, løsner du på rattet (5) på hver side av mekanismen. Trekk deretter opp nakkestøttemekanismen eller skyv den ned i festet, og lås mekanismen ved å stramme på rattene (5).




# MONTERINGSANVISNING


1. Ved montering av nakkestøtte på valgfri høy rygg må du plassere ryggen uten ryggstolpen med hullene opp og lett tilgjengelig.



2. Plasser ryggfestet (A) på ryggplaten slik at det øverste hullet i ryggen er sentrert i det midterste hullet på ryggfestet (A). Sikre at justeringsrattene på ryggfestet (A) er plassert oppover slik at ryggfestet ikke sitter opp ned.

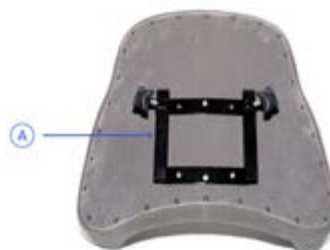

3. Plasser ryggstolpen over ryggfestet (A) slik at hullene i den ligger over hullene i ryggfestet (A). Før inn de medfølgende skruene M6x25 (B) i hullene på ryggen gjennom hullene i ryggstolpen og ryggfestet (A). Stram deretter skruene med en 5 mm unbrakonøkkel.

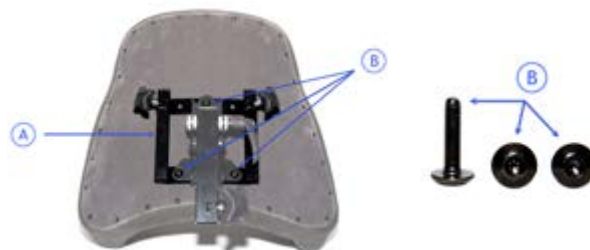

4. Plasser nakkestøtten (D/E) over hullene i nakkestøtteputen.



5. Skru av vrideren (1) og skru fast nakkestøtteputen med de medfølgende skruene M6x20 (C).



6. Skru fast vrideren (1) og monter (2) deretter nakkestøttemekanismen (D/E) med ryggfestet (A).



# HURTIGVEILEDNING FOR KOMPLETT NAKKESTØTTEMEKANISME


type nakkestøttemekanisme

type nakkestøttepute

materiale og farge på nakkestøtteputen

komplett nakkestøttemekanisme med pute

| ART. NR. |    |    |                                                               |
|----------|----|----|---------------------------------------------------------------|
| NS       | 10 |    | Nakkestøttemekanisme L, h = 48                                |
| NS       |    | 20 | Nakkestøttepute EM PLUS 30 x 23, plysj, grå                   |
|          |    | 46 |                                                               |
|          |    |    |                                                               |
|          |    |    |                                                               |
| NS       | 10 | 20 | 46 Nakkestøtte L h 48 komplett<br>EM PLUS 30 x 23, plysj, grå |
|          |    |    |                                                               |

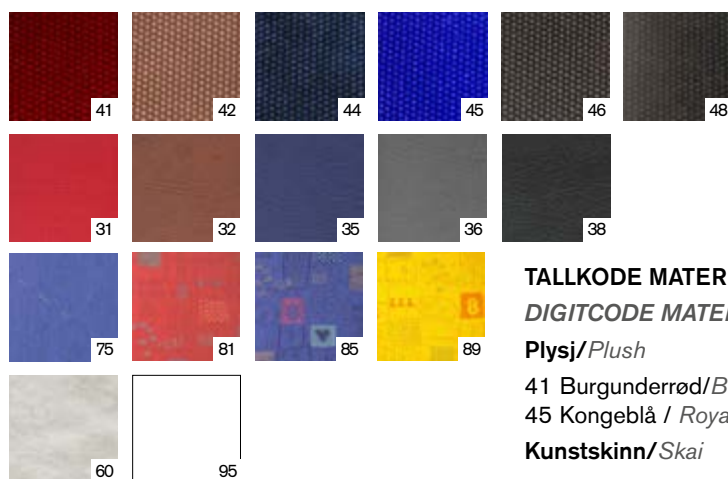

## TALLKODE MATERIALE OG FARGE

### DIGITCODE MATERIAL AND COLOUR

#### Plysj/Plush

41 Burgunderred/Burgundy

42 Brun/Brown

44 Marineblå/Marine

45 Kongeblå / Royal blue

46 Grå/Grey

48 Svart/Black

#### Kunstskinn/Skai

31 Rød/Red

32 Brun/Brown

35 Blå/Blue

36 Grå/Grey

38 Svart/Black

#### Mønstret stoff, voksen / Patterned fabric, Adult

75 Blå

75 Blue

#### Mønstret stoff, barn / Patterned fabric, Child

81 Rød/Red

85 Blå/Blue

89 Gul/Yellow

#### Alternativt trekk / Alternative covering

60 Hygienestoff / Hygiene fabric

95 Uten trekk / Without clothing

## DESTRUERINGSANVISNING

NAKKESTØTTEPUTE

– sorteres som *brennbart materiale*

NAKKESTØTTEMEKANISME

– sorteres som *stål*



Mercado Medic AB  
Tryffelslingan 14  
SE-181 57 Lidingö

Telefon og faks  
Tlf. +46 8 555 143 00  
Faks +46 8 555 143 99

E-post og internett  
E-post info@mercado.se  
Internett www.mercado.se

**FORHANDLER I NORGE**



Telefon 66 96 38 00  
[www.sunrisemedical.no](http://www.sunrisemedical.no)



**Mercado Medic AB**  
Tryffelslingan 14  
SE-181 57 Lidingö

**Telefon og faks**  
Tlf. +46 8 555 143 00  
Faks +46 8 555 143 99

**E-post og internett**  
E-post [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)  
Internett [www.mercado.se](http://www.mercado.se)