


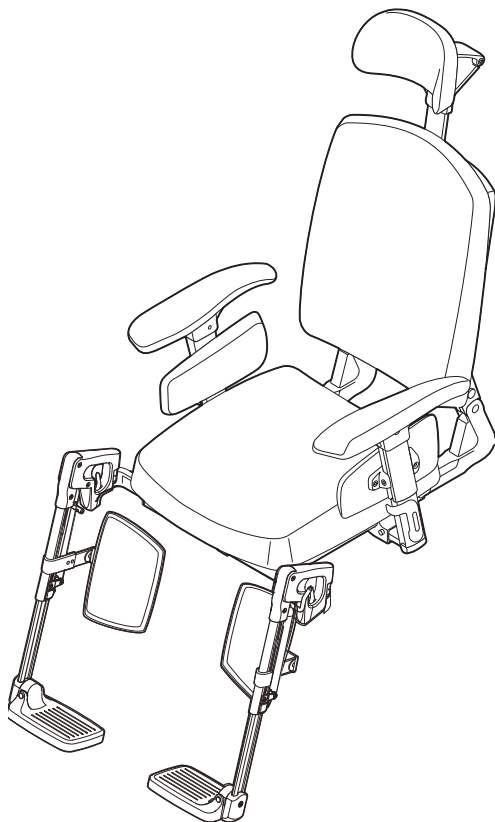

Sedeo Pro

GEBRUIKERSHANDLEIDING **NL**

SEDEO

1011650 G

Sedeo Pro

© 2016 Sunrise Medical

Alle rechten voorbehouden.

De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met welke middelen dan ook (elektronisch of mechanisch), zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sunrise Medical.

De verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ten tijde van verschijnen bekende constructies. Sunrise Medical voert een beleid van continue product verbetering, wijzigingen zijn derhalve voorbehouden.

De verstrekte informatie is geldig voor het product in standaard uitvoering. Sunrise Medical kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het product. Derhalve kunnen de getoonde afbeeldingen afwijken van uw configuratie.

De beschikbare informatie is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar Sunrise Medical kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de informatie of voor de gevolgen daarvan. Sunrise Medical kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd.

De door Sunrise Medical gehanteerde gebruiksnamen, handelsnamen, handelsmerken, etc. mogen krachtens de wetgeving inzake de bescherming van handelsmerken niet als vrij worden beschouwd.

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	6
1.1	Deze gebruikershandleiding	6
1.2	Voor meer informatie	6
1.3	Gebruikte symbolen in deze handleiding	6
2	Veiligheid	7
2.1	Temperatuur	7
3	Algemene beschrijving	8
3.1	Sedeo Pro productbeschrijving	8
4	Gebruik	9
4.1	Verstellen van het zitsysteem (door gebruiker/begeleider)	9
4.2	In- en uitstappen (voorwaartse transfer)	12
4.3	In- en uitstappen (zijwaartse transfer)	13
4.4	Opties / accessoires	13
5	Instellen	15
5.1	Zitdiepte	15
5.2	Zitbreedte	15
5.3	Rugleuninghoek	16
5.4	Rugleuninghoogte	16
5.5	Standaard en comfort beensteun	16
5.6	Voetplaten (voor grote / kleine zitbreedtes)	17
5.7	Comfort beensteunen	18
5.8	Centrale beensteun	18
5.9	Elektrische centrale beensteun	19
5.10	Armsteun	21
5.11	Zwaartepunt instellen	25
5.12	Hoofdsteun	25
5.13	Vaste / wegzwenkbare bedieningskasthouder	26
5.14	Abductiesteun	27
5.15	Spanbandenrug flexibel	28
5.16	Rugpelot	28
5.17	Bovenbeenkussen	29
5.18	Heupgordel monteren	30
5.19	Rugleuning van derden	31
6	Transport	32
6.1	Zitsysteem verkleinen voor rolstoelvervoer	32
6.7	Zitsysteem opbouwen na rolstoelvervoer	34
7	Onderhoud	36
7.1	Bekleding reinigen	36
8	Storingen	37

9	Technische specificaties.....	38
9.1	Verklaring en normen	38
9.2	Technische gegevens	38
10	Labels.....	41
10.1	Aanduidingen op het zitsysteem	41
11	Garantiebepalingen.....	42

1 Voorwoord

1.1 Deze gebruikershandleiding

Met deze gebruikershandleiding kunt u het zitsysteem op veilige wijze gebruiken en onderhouden. Deze gebruikershandleiding vormt een aanvulling op de algemene handleiding van de Sunrise Medical rolstoel. Deze gebruikershandleiding verwijst daar waar nodig naar andere handleidingen zoals hieronder aangegeven:

-  Rolstoel: Verwijst naar de algemene gebruikershandleiding van de rolstoel.
-  Bedieningskast: Verwijst naar de gebruikershandleiding van de bedieningskast (alleen van toepassing bij elektrische rolstoelen).

Lees deze gebruikershandleiding en de andere handleidingen waar naar verwezen wordt zorgvuldig door, voordat u het product in gebruik neemt. Indien één van de handleidingen niet met het product meegeleverd is, neem dan direct contact op met uw dealer.

Naast deze gebruikershandleiding is er ook een servicehandleiding voor de gekwalificeerde specialist beschikbaar.

Als u visueel gehandicapt bent kan dit document ook worden gelezen in pdf-formaat op www.SunriseMedical.eu en is ook beschikbaar in grote tekst formaat op aanvraag.

1.2 Voor meer informatie

Neem contact op met uw plaatselijke, erkende Sunrise Medical dealer als u vragen hebt over het gebruik, het onderhoud of de veiligheid van uw rolstoel. In het geval dat er geen erkende dealer in uw buurt of u nog vragen heeft, neem dan schriftelijk of telefonisch contact op met Sunrise Medical.

Voor informatie over productveiligheidsberichten en terughaalacties, gaat u naar www.SunriseMedical.eu

1.3 Gebruikte symbolen in deze handleiding

Let op!

Gebruiker attent maken op mogelijke problemen.

⚠ Voorzichtig!

Adviezen voor gebruiker ter voorkoming van beschadigingen aan het product.

⚠ Waarschuwing!

Waarschuwingen voor gebruiker ter voorkoming van persoonlijk letsel.

Het niet met de nodige voorzichtigheid opvolgen van deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel of tot schade aan het product of het milieu!

Symbolen in illustraties

In elke illustratie is met iconen en een nummering aangegeven wat u in welke volgorde moet doen.



Draai 1 slag los met vleugelmoer



Draai 1 slag vast met vleugelmoer



Draai 1 slag los met torx



Draai 1 slag vast met torx



Actie 1, 2 enz.

Pijlen in illustraties geven aan dat het betreffende onderdeel in de aangegeven richting beweegt of bewogen moet worden.

2 Veiligheid

Waarschuwing!

Volg altijd de instructies op bij de waarschuwingen! Als de instructies niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel, schade aan de rolstoel of aan het milieu tot gevolg hebben. Daar waar mogelijk zijn de waarschuwingen geplaatst in de relevante hoofdstukken.

Wees voorzichtig wanneer u onderdelen wegzwenkt / omhoogklapt. Contact met bewegende delen moet worden vermeden.

Voorzichtig!

Onderdelen van de rolstoel die voor service of reparatie moeten worden verwijderd zonder gereedschap (bijv. armsteun, beensteun) kunnen een negatieve invloed hebben op de ondersteuning van de gebruiker als ze ontbreken of niet weer in de juiste positie worden geplaatst.

2.1 Temperatuur

Waarschuwing!

Zorg dat de rolstoel niet langdurig aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Bepaalde onderdelen van de rolstoel, zoals de zitting, de rugleuning en de volledige armsteunen kunnen heet worden als ze te lang in de zon staan. Verbranding of overgevoeligheid van de huid kan het gevolg zijn.

3 Algemene beschrijving

3.1 Sedeo Pro productbeschrijving

Op de rolstoel is het Sedeo Pro zitsysteem gemonteerd. Het Sedeo Pro zitsysteem biedt een uitstekende ondersteuning voor hoofd, romp, armen en benen. Als het lichaam goed wordt ondersteund stelt dat de gebruiker in staat om zoveel mogelijk handelingen zelf uit te voeren.

Het instellen van de rolstoel dient te gebeuren door een hiertoe opgeleide specialist. Foutieve instellingen kunnen leiden tot negatieve gevolgen voor de zithouding.

⚠ Voorzichtig!


U behoort goed op de hoogte te zijn van de inhoud van deze handleiding voordat u het zitsysteem in gebruik neemt.

Meegeleverd gereedschap

Bij het zitsysteem wordt een T30 sleutel meegeleverd. Hiermee kunnen alle instellingen van het zitsysteem worden uitgevoerd door een professional. De T30 sleutel (A) bevindt zich op de in de figuur 1 aangegeven plaats op het frame.

⚠ Let op!

Op het zitsysteem zijn er op verschillende plaatsen schaalverdelingen aangebracht. De af-fabriek instellingen zijn gemarkeerd.

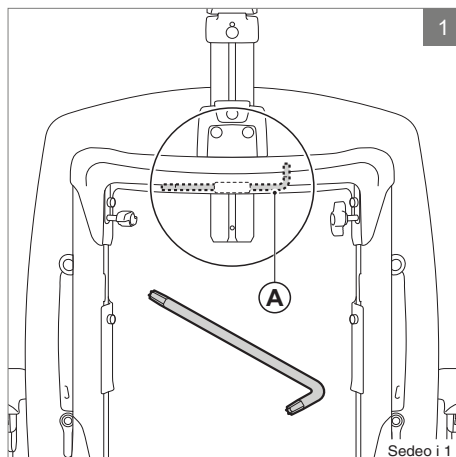

4 Gebruik

4.1 Verstellen van het zitsysteem (door gebruiker/begeleider)

Rughoekverstelling met gasveer (door begeleider)

1. Knijp (A) in.
2. Stel (B) in de gewenste stand.

Let op!

Houd (A) ingeknepen.

3. Laat (A) los.



Rughoekverstelling met gasveer (door gebruiker)

1. Knijp (A) in.
2. Leun voor- of achterover om (B) in te stellen.

Let op!

Houd (A) ingeknepen.


3. Laat (A) los.

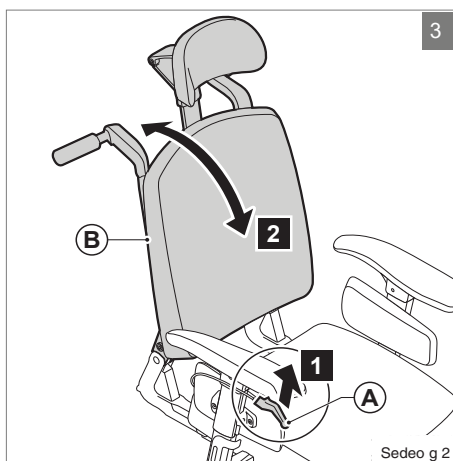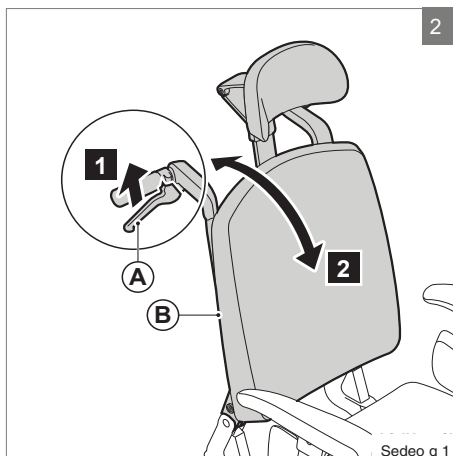

Comfort beensteunen kniehoek


De comfort beensteunen zijn onafhankelijk van elkaar in hoek verstelbaar.

1. Duw de hendel (B) naar voren.
2. Beweeg uw been omhoog.
3. Laat de hendel los in de gewenste stand.

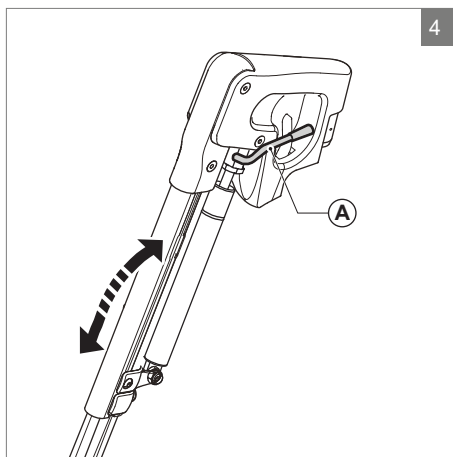

Kniehoek centrale comfort beensteun


1. Draai (A) een kwart slag.
2. Trek (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

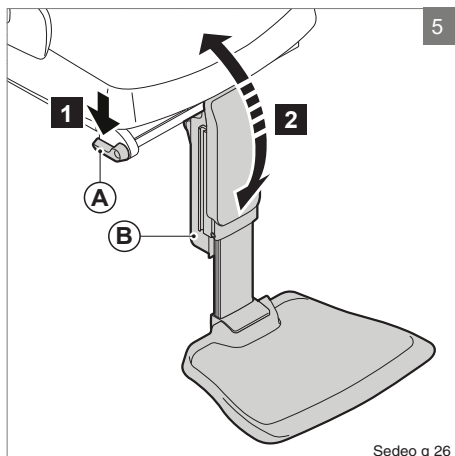

Sedeo g 26

Bedieningskasthouder naar binnen plaatsen


1. Duw (A) tot de “klik” naar binnen.

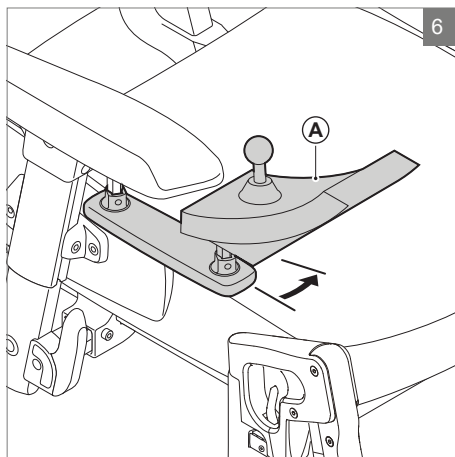**Bedieningskasthouder wegzwenken**

1. Druk (A) tot de “klik” naar buiten.


Let op!

Door de bedieningskasthouder weg te zwenken kunt u dichtbij aan de tafel “aanschuiven”. Het blijft mogelijk alle bedieningsfuncties uit te voeren.

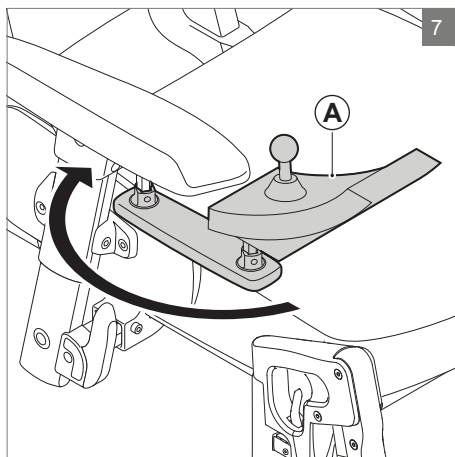

Duwbeugelhoogte

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

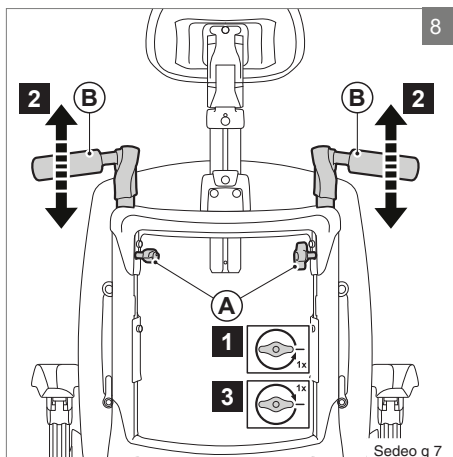


Hoekverstelbare duwbeugel

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

⚠ Waarschuwing!

Gebruik duwbeugel niet om de gehele stoel achterover te kiepen, om bijvoorbeeld een stoep op te gaan.

De duwbeugel is daarvoor niet geschikt.

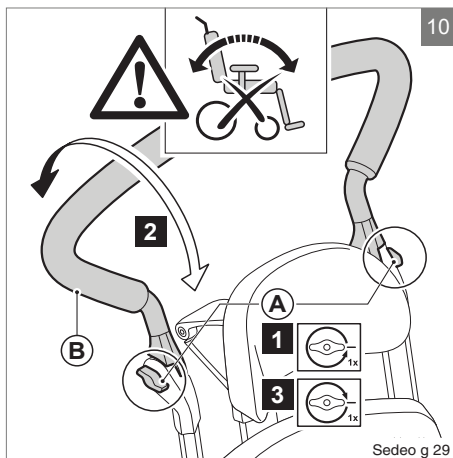


Hemiplegie armlegger

1. Trek (A) uit borgstand en draai (B) in gewenste stand.

Let op!

Zorg er voor dat (B) goed wordt geborgd!

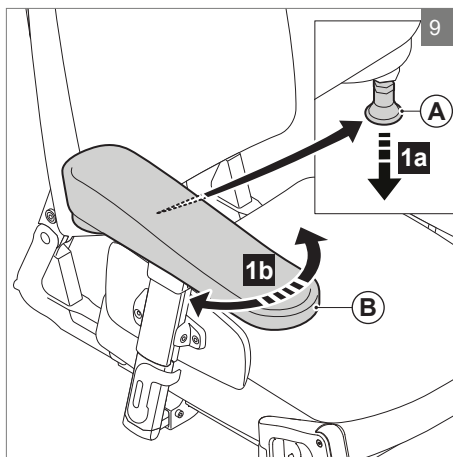

4.2 In- en uitstappen (voorwaartse transfer)

⚠ Waarschuwing!


Ga niet op de voetsteunen staan. Als u met het volle gewicht op de steunen gaat staan, kan dit tot schade en gevaarlijke situaties leiden. De stoel kan onder andere kantelen.

Wegzwenkbare beensteunen

1. Klap de voetsteunen (A) omhoog
2. Zwenk kuitplaten (B) weg (indien van toepassing)
3. Indien mogelijk trek (C) naar achter en zwenk de beensteunen (D) weg
4. Neem plaats in de stoel

Voetplaat centrale beensteun opklappen


1. Klap (A) omhoog.

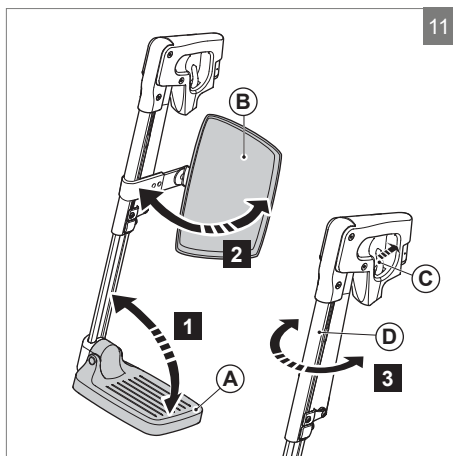

Sedeo g 14

Voetplaat centrale elektrische beensteun opklappen

1. Klap (A) omhoog.

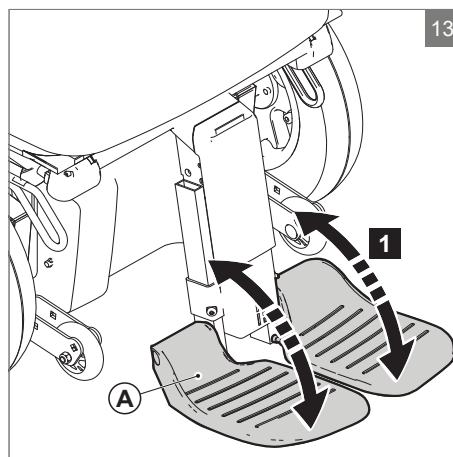

4.3 In- en uitstappen (zijwaartse transfer)

Let op!

Afhankelijk van de uitvoering van de bedieningskast, kan het nodig zijn om dit weg te zwenken.

Armsteun uitnemen

1. Kantel (A) naar beneden.
2. Verwijder (B).

Armsteun wegklappen



1. Druk (A) in.
2. Klap (B) achterover.

⚠ Voorzichtig!

Verwijder eerst het werkblad voordat de armsteun wordt weggeklapt.

⚠ Waarschuwing!

Leun niet op de armsteun terwijl deze opgeklapt is.

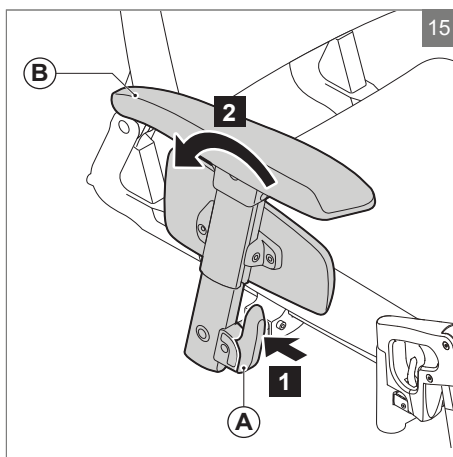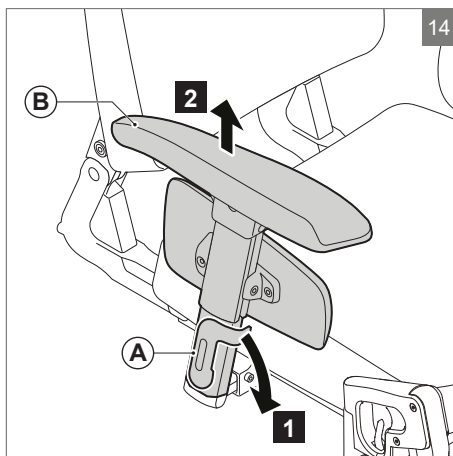

4.4 Opties / accessoires


Hoofdsteun verwijderen/plaatsen

1. Kantel (A) omhoog.
2. Schuif (B) uit of in (C).
3. Kantel (A) omlaag.

Let op!

Afhankelijk van de uitvoering van de bedieningskast, kan het nodig zijn om dit weg te zwenken.

Schuif de hoofdsteun altijd tot de aanslag in de steun.

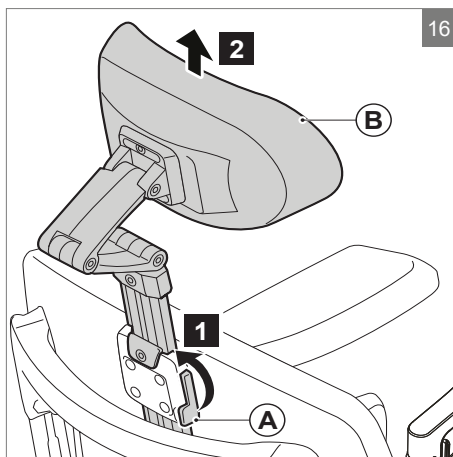

Abductiesteun wegklappen


1. Trek (A) uit borgstand en klap (B) weg.
2. Laat (A) los.

Abductiesteun terugklappen


3. Trek (A) uit borgstand en klap (B) terug.
4. Laat (A) in borgstand los.

Let op!


Zorg er voor dat (B) goed wordt geborgd!

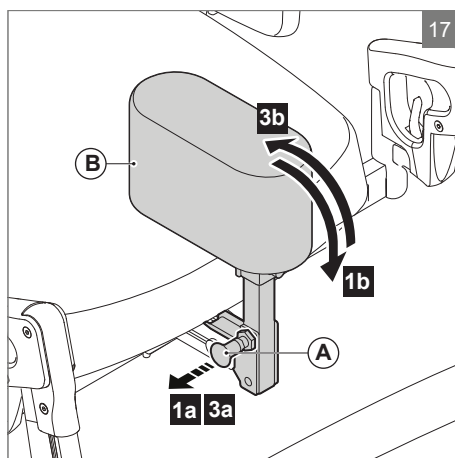**Rugpelot wegklappen**

1. Druk (A) in om (B) weg te klappen.

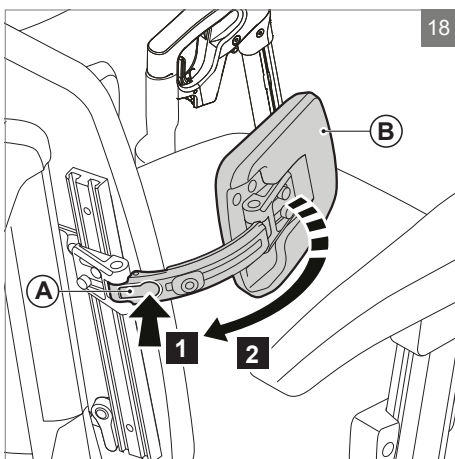**Bovenbeensteun uitnemen**

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Neem (B) uit.

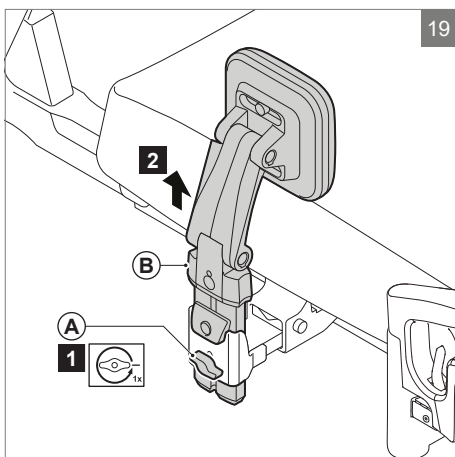

5 Instellen

Er bestaat niet zoiets als de gemiddelde rolstoelgebruiker. Daarom zijn de zitsystemen van Sunrise Medical in te stellen op de specifieke situatie van de gebruiker. We maken daarbij onderscheid tussen het instellen en verstellen van het zitsysteem. Instellen gebeurt in principe eenmalig en moet door de dealer worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verstellingen kunnen door de gebruiker zelf worden uitgevoerd. Voor verstellingen is geen gereedschap benodigd.

Let op!

Op het zitsysteem zijn er op verschillende plaatsen schaalverdelingen aangebracht. De af-fabriek instellingen zijn gemarkeerd.

5.1 Zitdiepte

Instelling van de rugbuizen




1. Draai (A).
2. Stel (B) in de gewenste stand.
3. Haal (A) aan tot 7 Nm.

Instelling van de zitting

1. Verwijder de zitting (Zie "Gebruik - Zitsysteem verkleinen voor rolstoelvervoer).
2. Verwijder de schroeven (B).
3. Verplaats (C) en (D).
4. Draai de schroeven (B) vast.
5. Plaats de zitting (zie "Gebruik - Zitsysteem opbouwen na rolstoelvervoer).


5.2 Zitbreedte

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

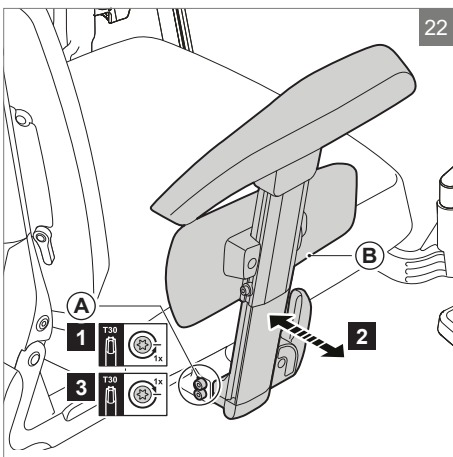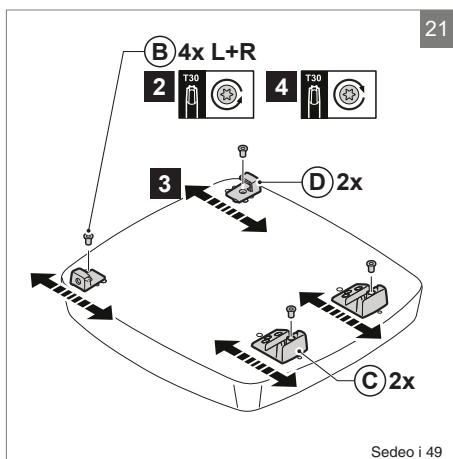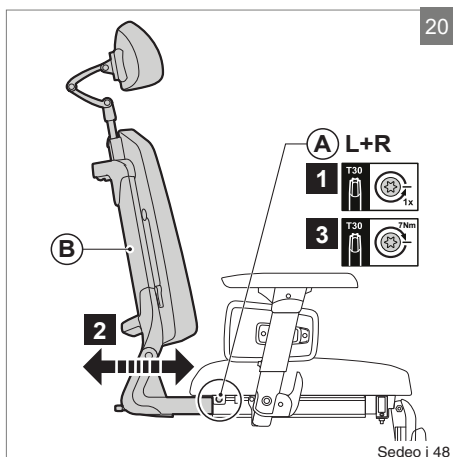


5.3 Rugleuninghoek

1. Draai (A) om (B) in te stellen.

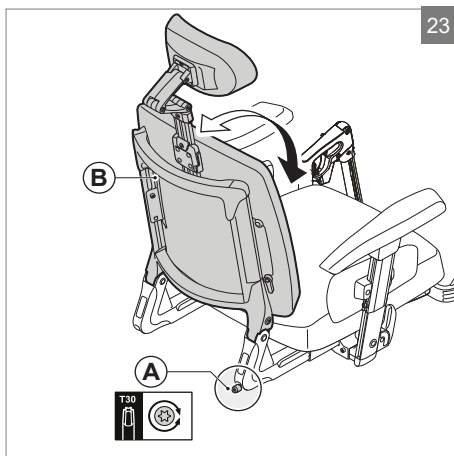

5.4 Rugleuninghoogte


1. Draai (A) 1 slag los.
2. Stel (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

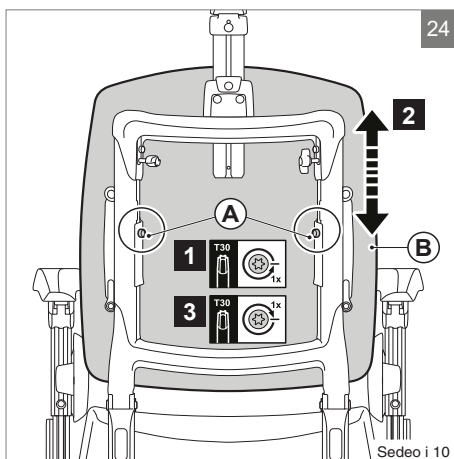

5.5 Standaard en comfort beensteun

Beensteunbreedte

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

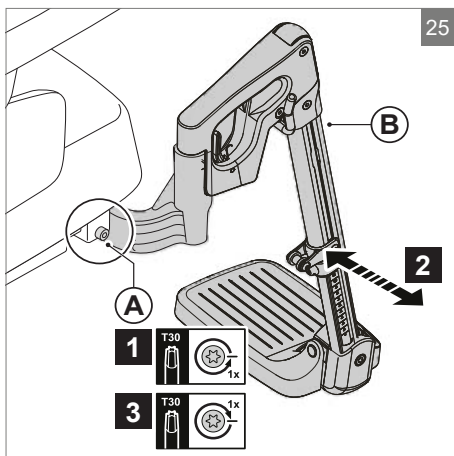


Onderbeenlengte

1. Draai de stelschroef (A) enkele slagen los met inbus 4.
2. Schuif de voetplaat (B) in de gewenste stand.
3. Draai de stelschroef (A) vast.


⚠ Voorzichtig!

Houd voldoende vrije ruimte onder (B) om over obstakels te kunnen rijden.

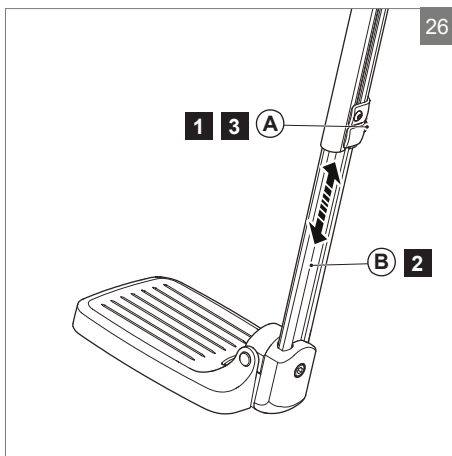

Voetplaathoek

1. Draai de inbusbout (A) enkele slagen los.
2. Stel de gewenste voetplaathoek (B) in.
3. Draai (A) vast.

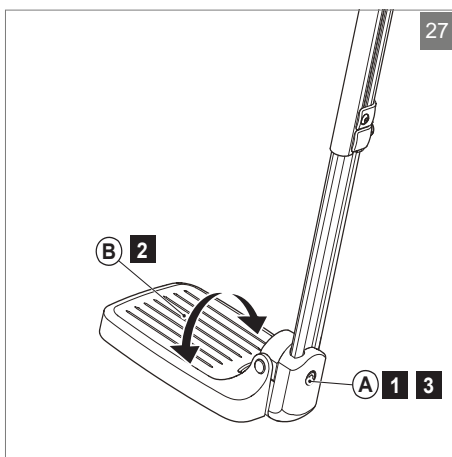

5.6 Voetplaten (voor grote / kleine zitbreedtes)


Voetplaatdiepte

De voetplaat is asymmetrisch bevestigd. Links en rechts kunnen omgewisseld worden.

1. Draai de stelschroef (A) los met inbus 4.
2. Neem de voetplaat met onderbuis uit.
3. Schuif de onderbuis in de andere beensteun.
4. Draai de stelschroef (A) vast.

⚠ Voorzichtig!

Zorg dat de zwenkwielen de voetplaten niet raken bij het manoeuvreren. Als dit wel gebeurt, moeten de beensteunen verder naar voren worden ingesteld. Er moet minimaal 1 cm ruimte zijn tussen de zwenkwielen en de voetplaten

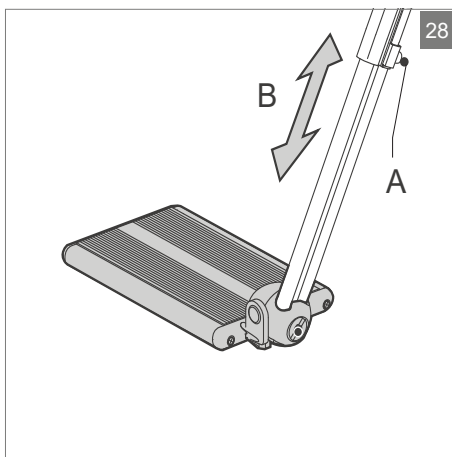

5.7 Comfort beensteunen

Kuitplaathoogte


1. Draai de inbusbouten (A) enkele slagen los met inbus 4.
2. Schuif de kuitplaat (D) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

Kuitplaatdiepte

4. Draai (B) enkele slagen los.
5. Schuif de kuitplaat (D) in de gewenste stand.
6. Draai (B) vast.

Kuitplaatbreedte

7. Draai (C) enkele slagen los.
8. Schuif de kuitplaat (D) in de gewenste stand.
9. Draai (C) vast.

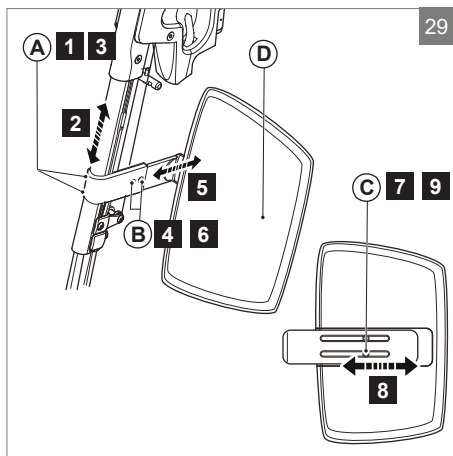


5.8 Centrale beensteun

Onderbeenlengte

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

⚠ Voorzichtig!

Houd voldoende vrije ruimte onder (B) om over obstakels te kunnen rijden.

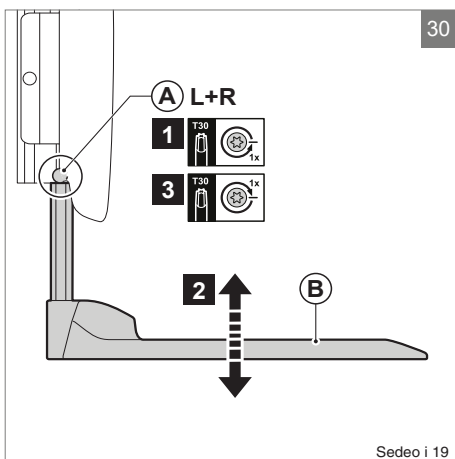


Kniehoek

1. Draai (A) 2 slagen los.
2. Stel de gewenste hoek van (B) in.
3. Draai (A) 2 slagen vast.


⚠ Voorzichtig!

Stel de hoogte of de kniehoek anders af indien de voetplaat de zwenkwieken raakt.

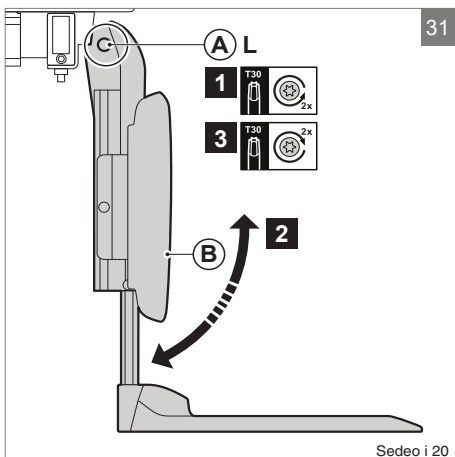

Enkelhoek


1. Klap (A) omhoog.
2. Verdraai (B) om de gewenste enkelhoek in te stellen.
3. Klap (A) omlaag.

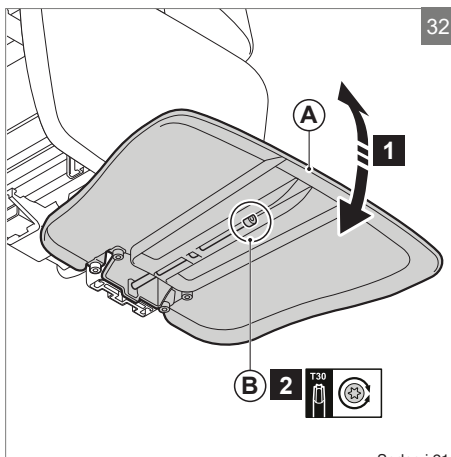

Sedeo i 21

Kuitplaathoogte

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

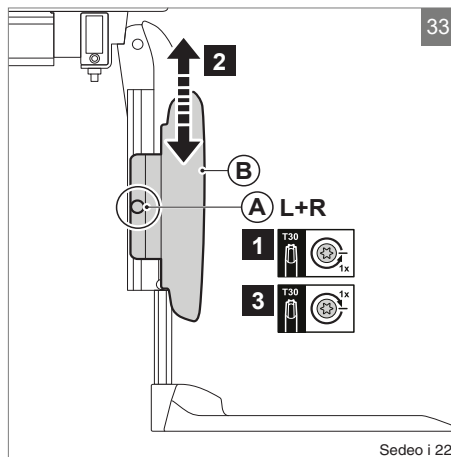

Sedeo i 22


5.9 Elektrische centrale beensteun

Onderbeenlengte

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.


⚠ Voorzichtig!

Houd voldoende vrije ruimte onder (B) om over obstakels te kunnen rijden.

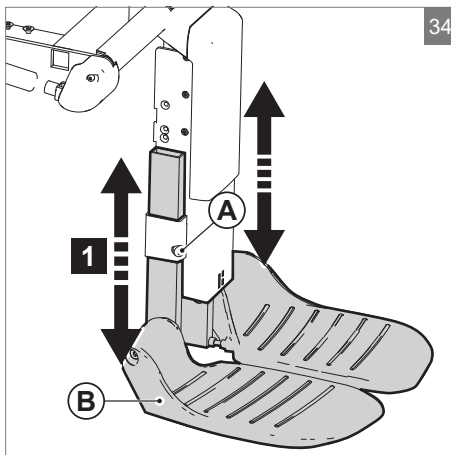


Enkelhoek


1. Klap (A) omhoog.
2. Verdraai (B) om de gewenste enkelhoek in te stellen.
3. Klap (A) omlaag.

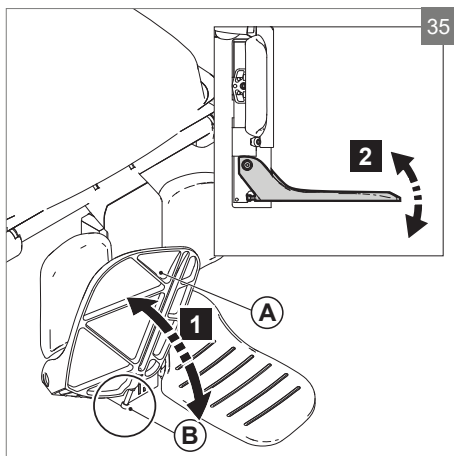**Kuitplaathoogte (1)**

1. Verlaag de onderbeenlengte.
2. Draai (A) los (2x).
3. Schuif (B) in de gewenste hoogte en schuif (A) voor hogere/lagere gaten (C).
4. Draai (A) vast (2x).

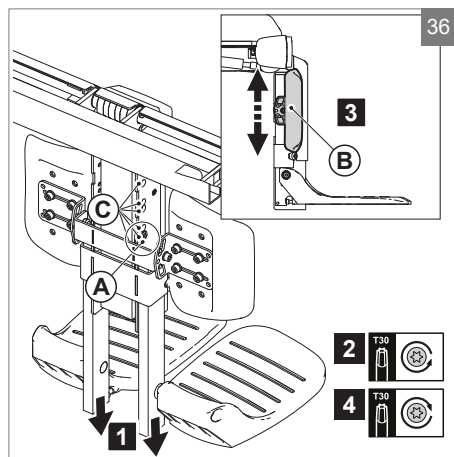
**Kuitplaathoogte (2)**

1. Draai (A) los.
2. Schuif (B) in de gewenste hoogte en schuif (A) voor hogere/lagere gaten.
3. Draai (A) vast.

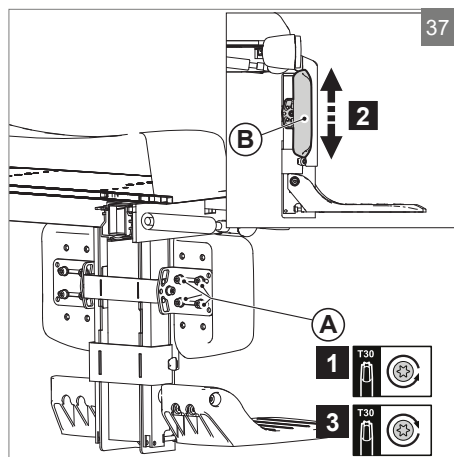


Kuitplaatbreedte

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

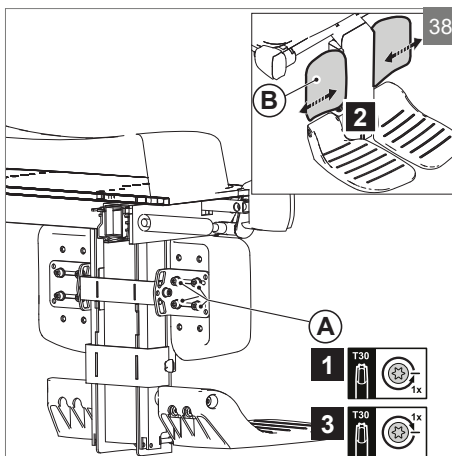

Kuitplaatdiepte

1. Draai (A) los.
2. Schuif (B) in de gewenste diepte en plaats (A) in het overeenkomende gat.
3. Draai (A) vast.

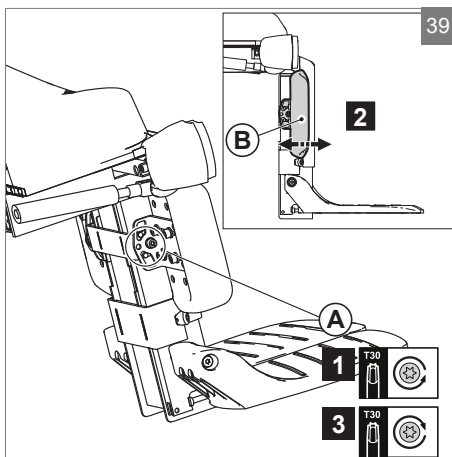


5.10 Armsteun

Armleggerhoogte

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Stel (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

Let op!

Zorg ervoor dat de armen goed worden ondersteund zonder dat de schouders omhoog worden gedrukt.

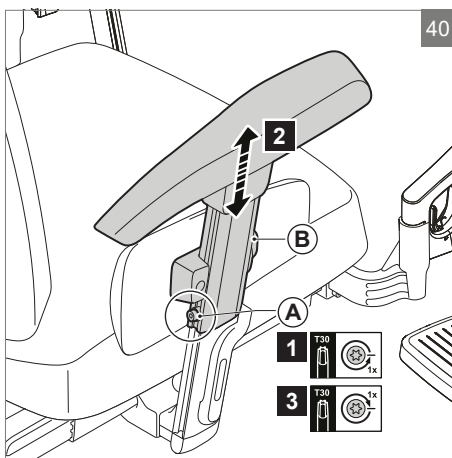


Armsteundiepte


1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

Let op!

Plaats de armsteun verder naar achter om meer vrije transferruimte te krijgen.

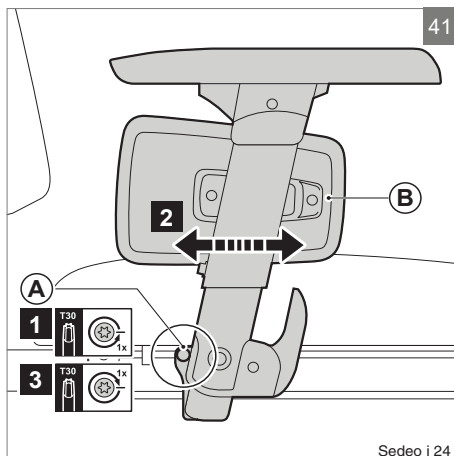
**Armleggerdiepte**

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

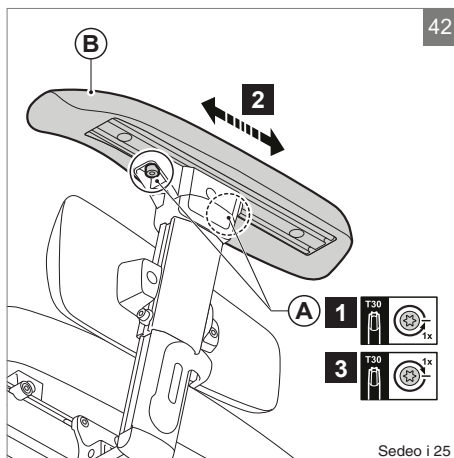
**Armleggerbreedte met of zonder bedieningskasthouder**

Verwijderen:


1. Draai (A) los.
2. Verwijder (B).

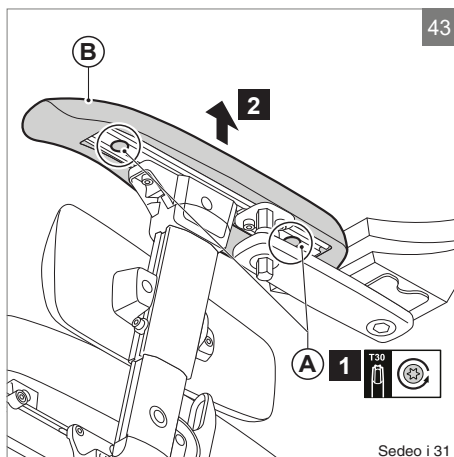

3. Draai (C), indien aanwezig, 1 slag los.
4. Verwijder (D) indien aanwezig.

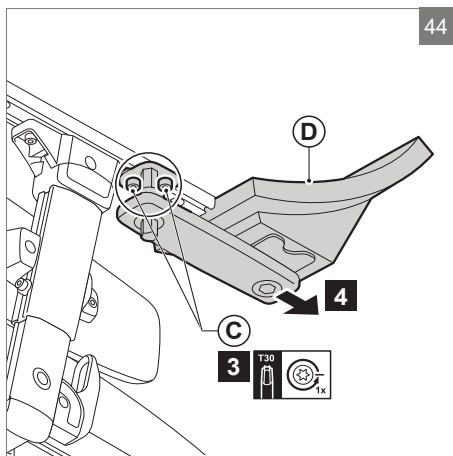

5. Draai (E) 1 slag los.
6. Verwijder (F).

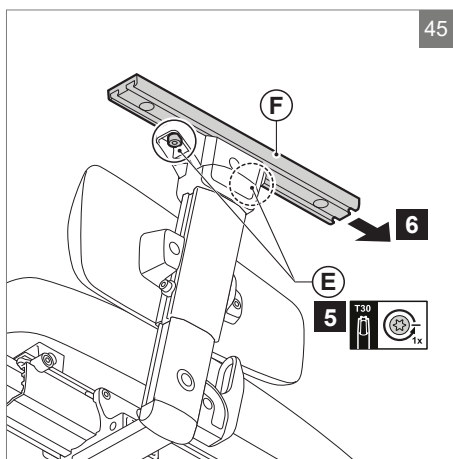


Plaatsen:


1. Schuif (A) met (B) of (C) op (D).

Let op!

Zorg ervoor dat de nok aan het klemblokje in het gat valt

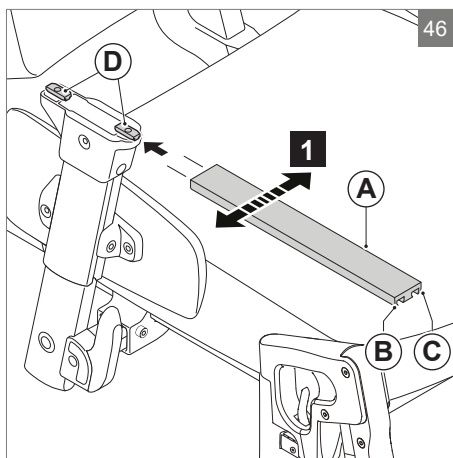


2. Stel de diepte van (A) in en draai (E) vast.
3. Plaats de bedieningskasthouder.
4. Plaats de armlegger.

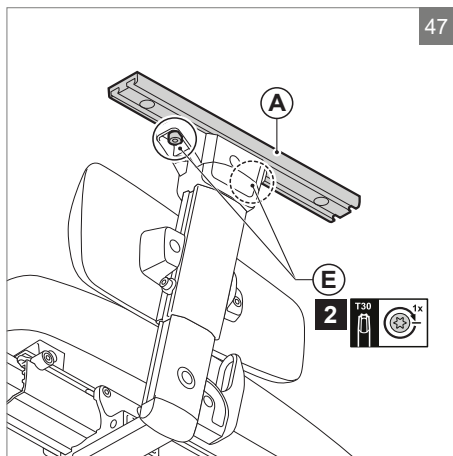


Armleggerhoek wijzigen

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Kantel (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

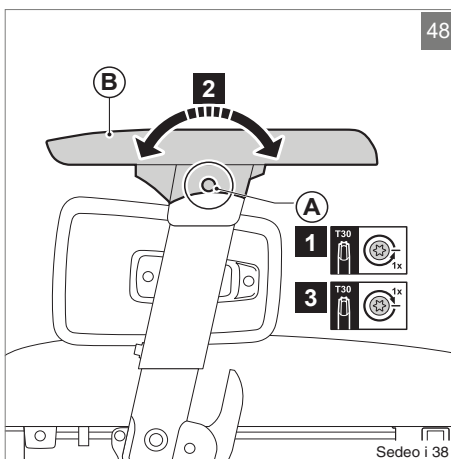

Zijschildhoogte

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Stel (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

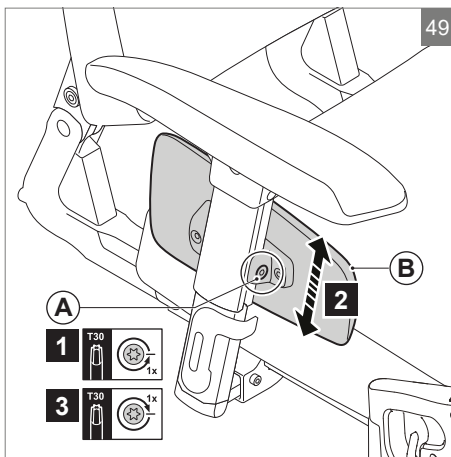

5.11 Zwaartepunt instellen


⚠ Waarschuwing!

Als het zwaartepunt van de rolstoel wordt gewijzigd, kan dit de rijeigenschappen en/of de dynamische stabiliteit van de rolstoel negatief beïnvloeden. Deze instelling mag alleen uitgevoerd worden door professionals.

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) naar voor of achter.
3. Draai (A) vast.

Let op!

Bij een gemiddelde gewichtsverdeling van de gebruiker wordt de zwaartepuntsinstelling op dezelfde waarde afgesteld als de zitdiepte. Voor een beter geleiding, draai de zitdiepte-instelling los

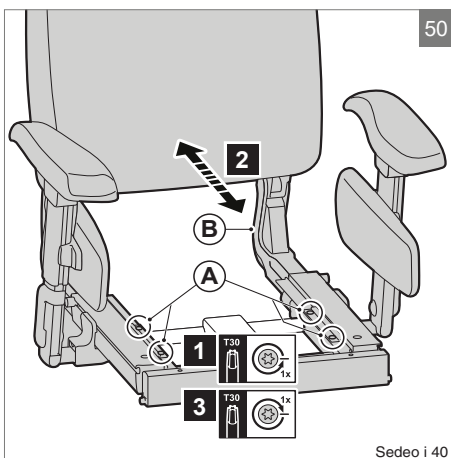


Sedeo i 40

5.12 Hoofdsteun

Hoofdsteunhoogte


1. Kantel (A) omhoog.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Kantel (A) omlaag.

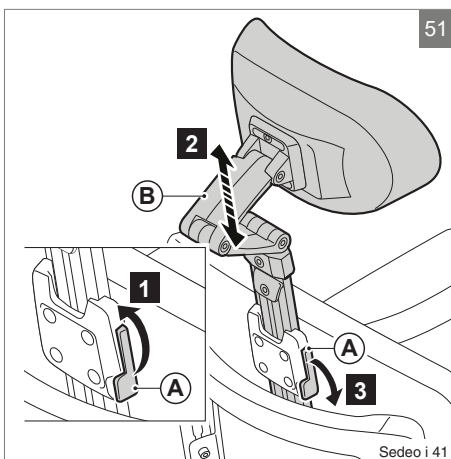

Sedeo i 41

Geheugenstand instellen

1. Draai (C) 1 slag los.
2. Schuif (D) zover mogelijk omlaag.
3. Draai (C) vast.

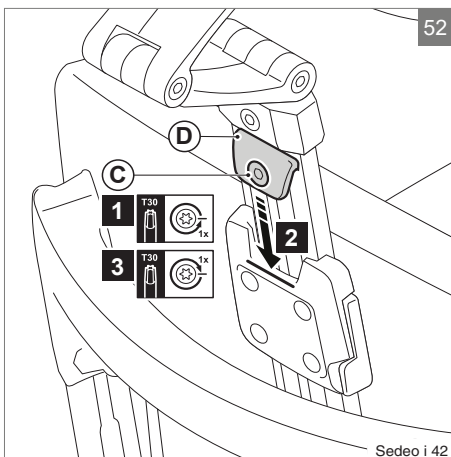


Sedeo i 42

Hoofdsteunpositie

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Stel (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

Let op!


Corrigeer de hoofdsteunhoogte en kantel het hoofdsteunkussen naar behoefte.

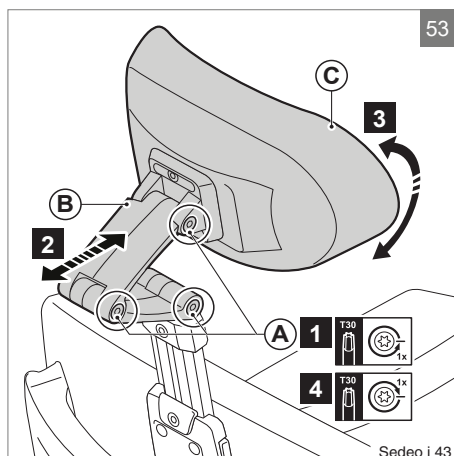

Sedeo i 43

Breedte hoofdsteunkussen


1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

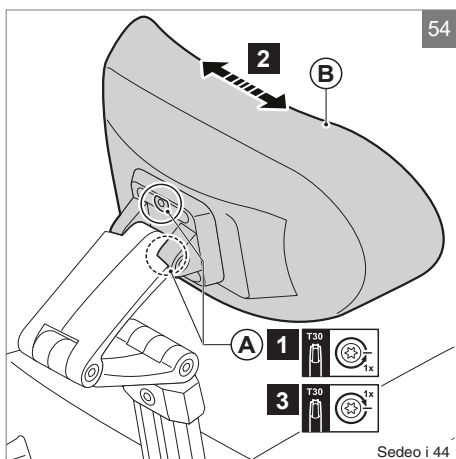

Sedeo i 44


5.13 Vaste / wegzwenkbare bedieningskasthouder**Diepte**

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

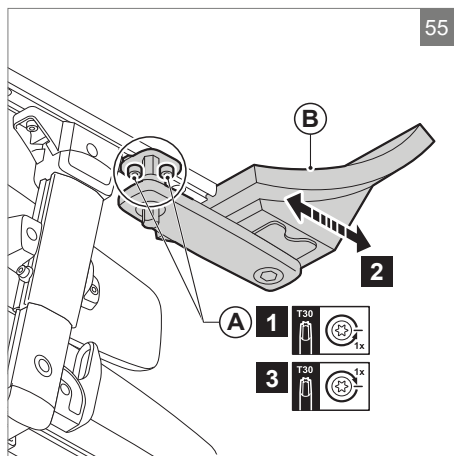


Hoogte (1)

1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

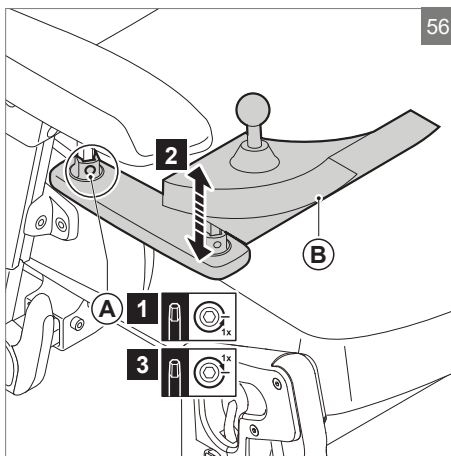**Hoogte (2)**

1. Draai (C) 1 slag los.
2. Schuif (D) in de gewenste stand.
3. Draai (C) vast.

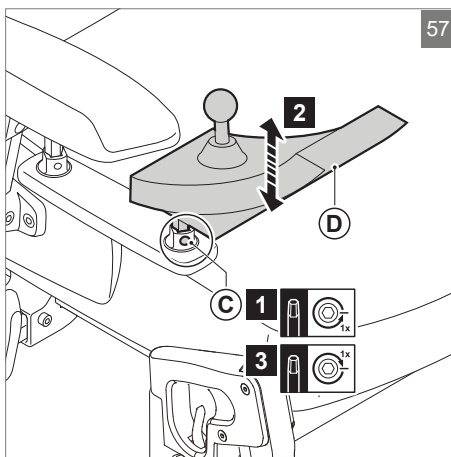
**5.14 Abductiesteun**

Voer de abductiesteuninstellingen als volgt uit:

1. Draai torx bout los.
2. Stel het onderdeel in op de gewenste positie.
3. Draai torx bout vast.

A/a. Hoogte-instelling.

B/b. Diepte-instelling.

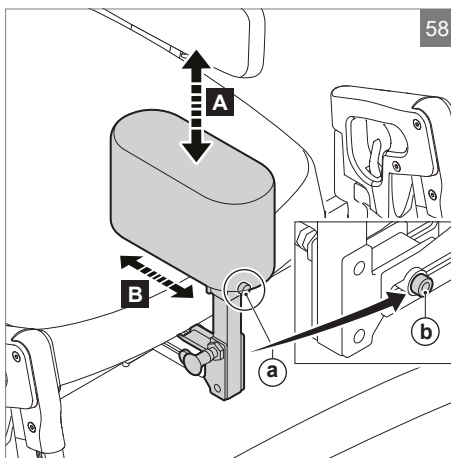


5.15 Spanbandenrug flexibel

De zijkanten van de spanbandenrug kunnen als volgt worden ingesteld:

1. Draai de 4 torx bout los.
2. Stel de zijkanten in op de gewenste positie.
3. Draai de 4 torx bout vast.

A/a. Hoek-instelling.

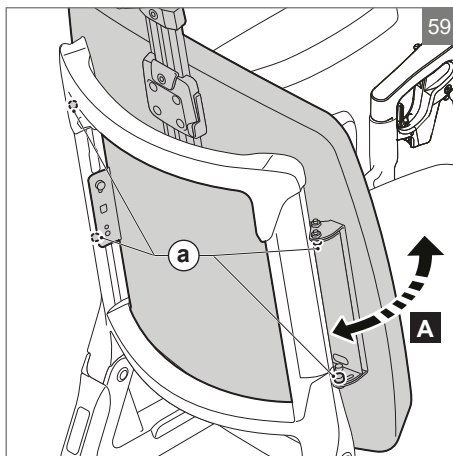


5.16 Rugpelot

Voer de rugpelotinstellingen als volgt uit:

1. Draai torx bout los.
2. Stel het onderdeel in op de gewenste positie.
3. Draai torx bout vast.


A/a. (Grove) Breedte-instelling

B/b. Hoogte-instelling

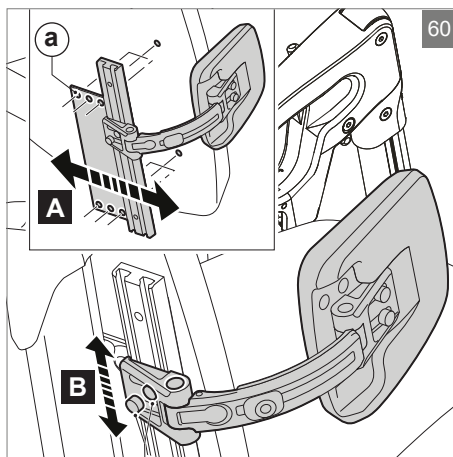


A/a. Beugeldiepte-instelling

B/b. Kussendiepte-instelling

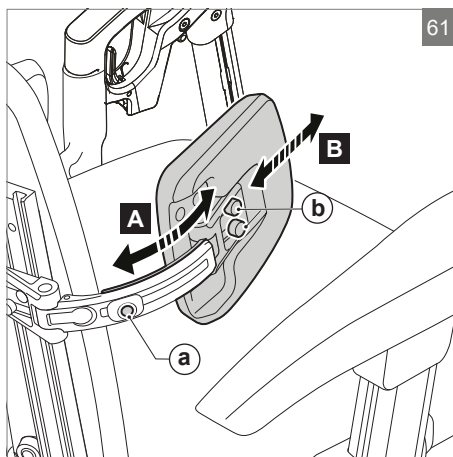

- A/a. Kussenhoekinstelling
B/b. (Fijne) Breedte-instelling

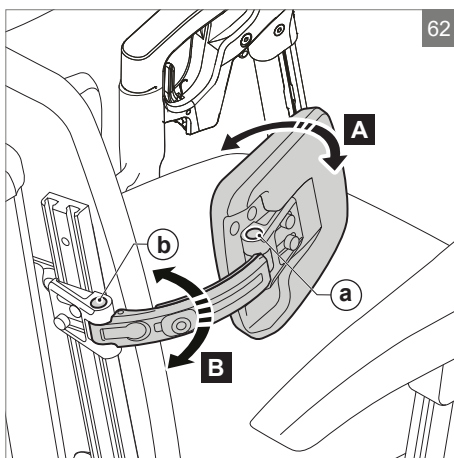


5.17 Bovenbeenkussen

Voer de bovenbeenkusseninstellingen als volgt uit:

1. Draai torx bout los.
2. Stel onderdeel in gewenste stand in.
3. Draai torx bout vast.


- A/a. Diepte-instelling
B/b. Breedte-instelling

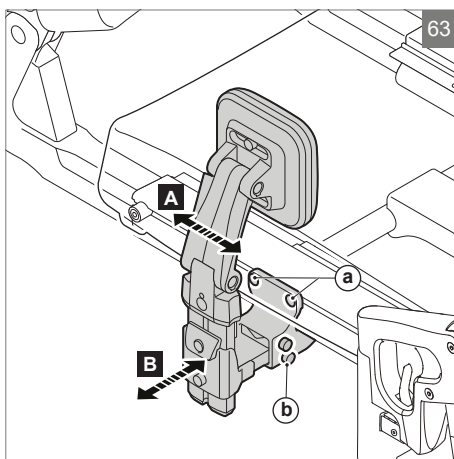

- A/a. Hoogte-instelling
B/b. Geheugenstandinstelling
C/c. Beugelpositie-instelling
D/d. Kussenpositie-instelling

Tip!


De hoogte-instelling kan worden vastgelegd met de geheugenstand.

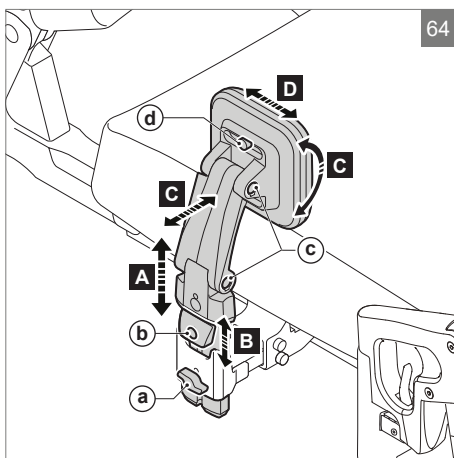

5.18 Heupgordel monteren


Montage op slider

1. Draai 2x (A) los en neem (A) uit linker en rechter slider.
2. Plaats (B) in sliders en draai deze op gewenste positie vast.
3. Plaats 2x (A) terug in sliders en draai (A) vast.

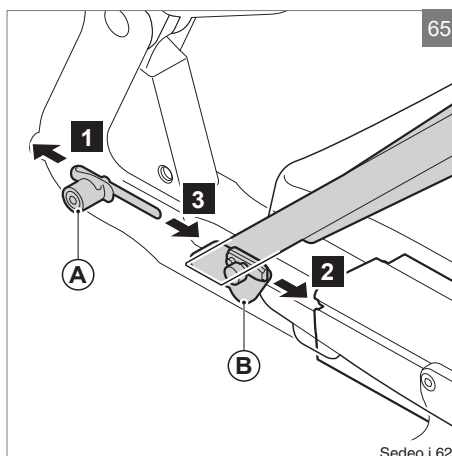

Montage op zitframe

1. Bevestig (A) op het zitframe met een bout aan de linker- en rechterzijde.

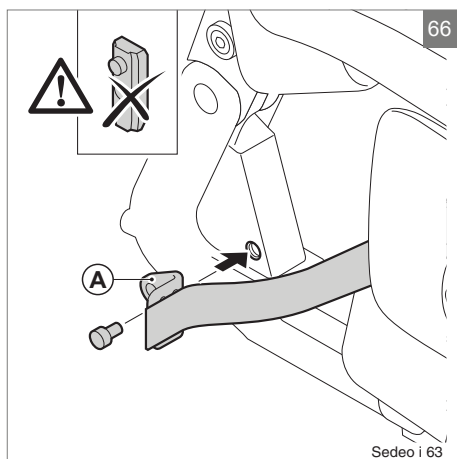


⚠ Waarschuwing!


Zorg ervoor dat de heupgordel is aangepast aan de rolstoelgebruiker. De gordel moet strak over de heup liggen met een hoek van ca. 45°.

Zorg ervoor dat de gordel te allen tijde schoon is en dat het vergrendelingmechanisme goed werkt. De gordel en het vergrendelingmechanisme kunnen met een vochtige doek worden schoongemaakt.

Wanneer de gordel boven de heup wordt geplaatst, over het weke gedeelte van de buik, kan dat leiden tot een verkeerde zithouding, waardoor de gebruiker onderuit zakt.

Gebruik de heupgordel nooit als een veiligheidsgordel tijdens transport.

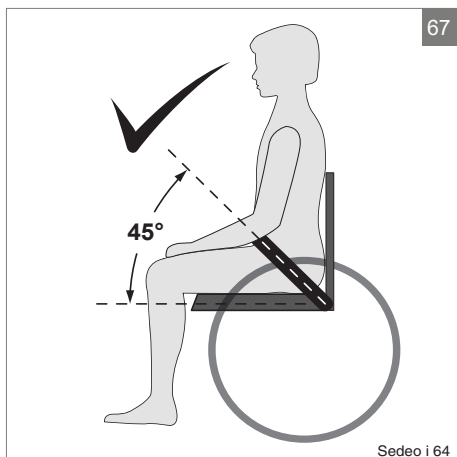

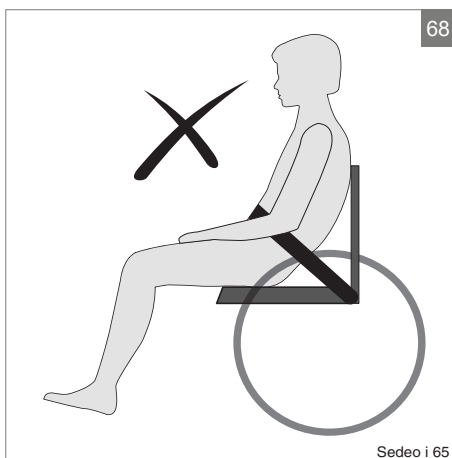

Sedeo i 65

5.19 Rugleuning van derden

Zitbreedte


1. Draai (A) 1 slag los.
2. Schuif (B) in de gewenste stand.
3. Draai (A) vast.

Zitdiepte

Zie 5.1 Zitdiepte.

Zwaartepunt instellen

Zie 5.9 Zwaartepunt instellen

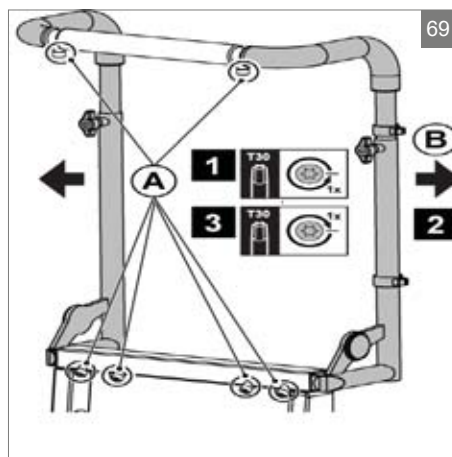

⚠ Waarschuwing!

Instellen van het zwaartepunt van het zitsysteem beïnvloedt de stabiliteit van de rolstoel. Deze instelling mag alleen uitgevoerd worden door professionals.

6 Transport

6.1 Zitsysteem verkleinen voor rolstoelvervoer

- B. Zitting (2,5 kg)
- C. Rugleuning (2,5 kg)
- D. Armsteun (2 kg)
- E. Beensteun (1,7 kg)
- F. Hoofdsteun (1,3 kg)


⚠ Waarschuwing!

De rolstoel kan, voor transport zonder inzittende, worden verkleind. Onderdelen van het zitsysteem die gemakkelijk kunnen worden losgenomen, moeten worden verwijderd. Berg deze op een veilige manier op zodat ze geen verwondingen of schade kunnen veroorzaken en/of zelf beschadigd kunnen raken.

Zitting verwijderen


1. Trek (A) omhoog en naar voren.

-

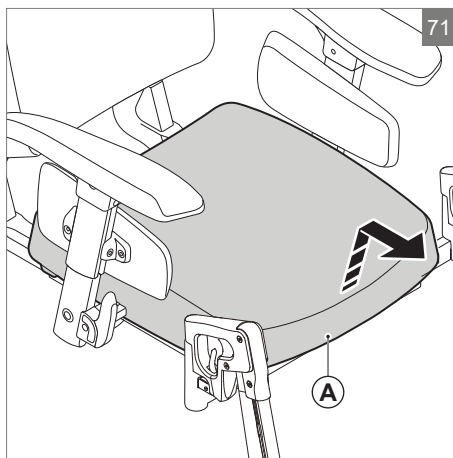

Rugkussen verwijderen

1. Verdraai (A) en (B).
2. Trek (C) vanaf de onderzijde naar voren en omhoog en verwijder deze.

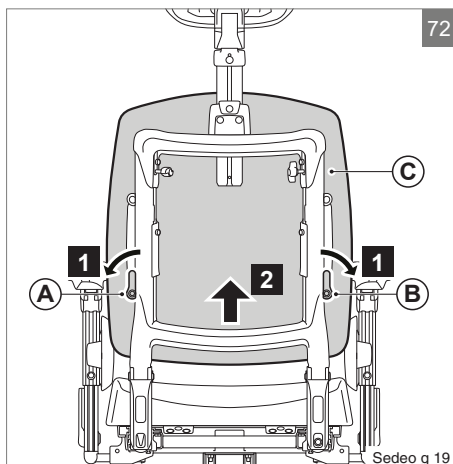

Rugleuning geheel voorover kantelen

1. Draai (A) los.


Let op!

Verwijder (A) niet.

2. Kantel (B) geheel voorover.

Let op!


Verwijder indien noodzakelijk eerst het rugkussen en/of de armsteunen.

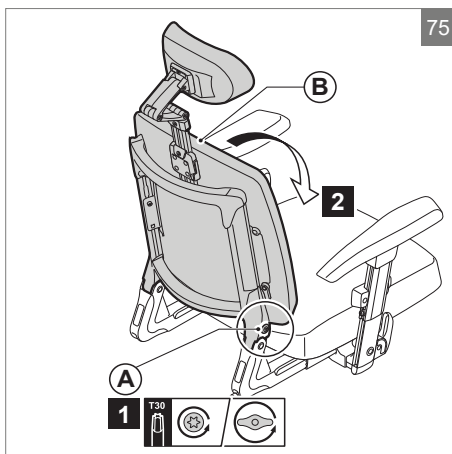

Wegzwekbare beensteun wegnemen


1. Maak de kuitband los.
2. Druk de pal (A) naar achteren, om de beensteun te ontgrendelen.
3. Zwenk de beensteun naar buiten.
4. Neem de beensteun (B) naar boven uit de beensteunhouder.

Bij het terugplaatsen van de beensteun moet u een klik horen, de beensteun is dan pas vergrendeld.

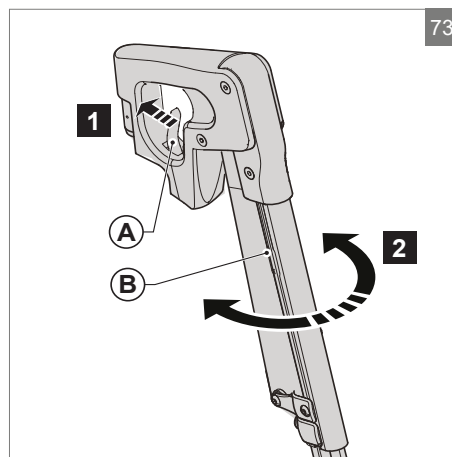

Armsteun verwijderen


1. Kantel (A) naar beneden.
2. Verwijder (B).

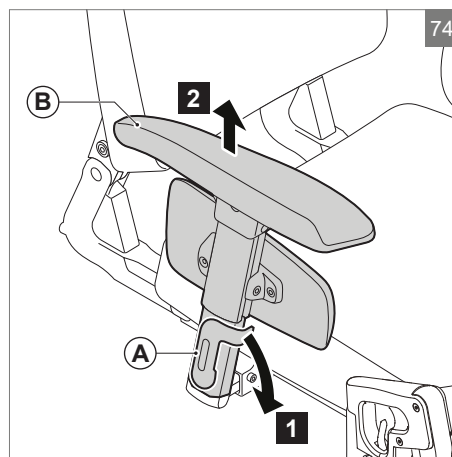

6.7 Zitsysteem opbouwen na rolstoelvervoer


Armsteun plaatsen

1. Schuif (A) op (B).
2. Kantel (C) omhoog.

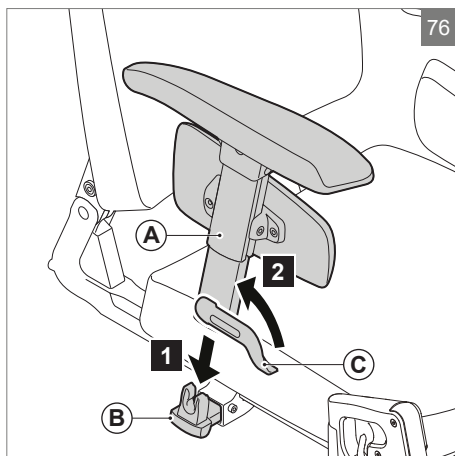

Rugleuning in gebruiksstand kantelen

1. Kantel (A) omhoog en achterover.
2. Draai (B) vast.

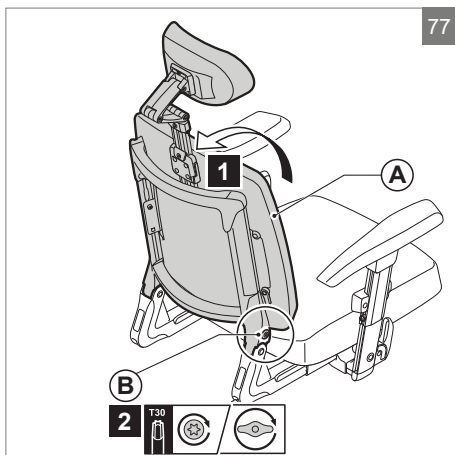


Rugkussen plaatsen

1. Haak (A) achter (B).
2. Verdraai (C).

⚠ Voorzichtig!

Zorg dat het rugkussen goed vast zit (hendels omhoog).

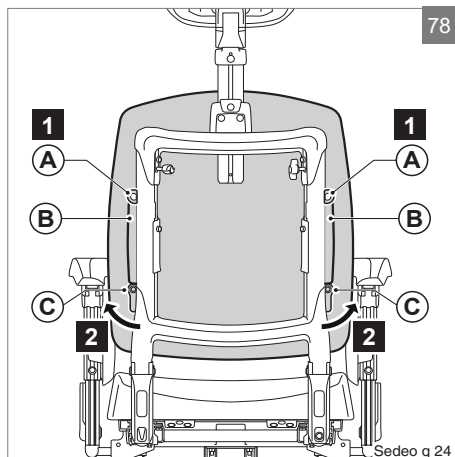


Zitting plaatsen

1. Schuif (A) en (B) over (C) en (D)
2. Druk (E) omlaag.

⚠ Voorzichtig!

Zorg dat de zitting aan de achterzijde met (A) en (B) onder de boutkoppen haakt.

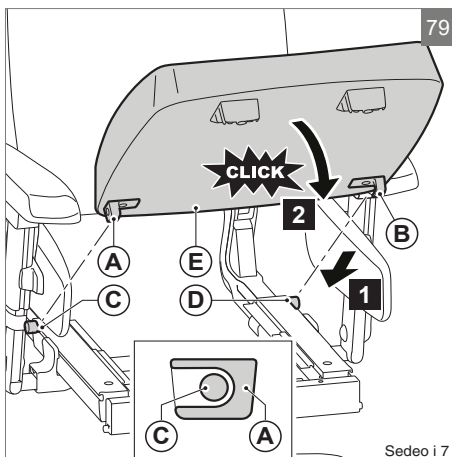

7 Onderhoud

Laat de rolstoel eenmaal per jaar, of bij intensief gebruik, eenmaal per half jaar controleren door uw dealer.

7.1 Bekleding reinigen

Reinig de bekleding met een vochtige doek en huishoudzeep. Wrijf de bekleding daarna droog met een zachte droge doek.

Pu onderdelen

Reinig de armleggers, zijkussens enz met een vochtige doek en huishoud zeep. Wrijf de onderdelen daarna droog met een zachte doek.

Bekleding zit en rugkussen

Volg het wasvoorschrift op de hoes:

Voor de incontinentie hoes zie figuur 80.

Voor de comfort hoes zie figuur 81.

⚠ Waarschuwing!

Gebruik geen organische oplosmiddelen als thinner, wasbenzine of terpentine.

Reinig de bekleding niet chemisch. Strijk of centrifugeer de bekleding niet.



8 Storingen

Neem contact op met uw dealer indien u een probleem heeft met uw zitsysteem.

9 Technische specificaties

9.1 Verklaring en normen

1. EN-ISO 10993-5 (1999-11) Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen.
2. EN 1021 1,2 Evaluatie van de ontbrandbaarheid van beklede meubelen. Ontstekingsbron: equivalent van smeulende sigaret/lucifervlam.

9.2 Technische gegevens

Omschrijving	Eenheid	Waardes
Zitsysteem		
Gebruikersgewicht	kg	160
Zitbreedte	mm	400 - 540
Zitbreedte (optie)	mm	520 - 680
Zitdiepte	mm	440 - 600
Zwaartepunt	mm	95
Zitting		
Zitkussendiepte positie	mm	-20 / 0 / +20
Rugleuning		
Rugleuning hoogte	mm	500 - 640
Rugleuning hoekinstelling	°	89 - 128
Rugverstelling (optie)	°	89 - 128
Armsteun		
Armlegger breedte	mm	-20 / 0 per zijde
Armlegger hoogte	mm	170 - 290
Armlegger hoogte (optie)	mm	270 - 390
Armsteundiepte	mm	80
Armlegger hoek	°	0 - 15°
Armlegger diepte kant bedieningskasthouder	mm	50
Armlegger diepte kant tegenover bedieningskasthouder	mm	160
Zijsteun		
Zijkussen hoogte	mm	65
Centrale beensteun		
Onderbeenlengte (met belast kussen)	mm	350 - 515

Omschrijving	Eenheid	Waardes
Kniehoek*	°	30 - 110
Enkelhoek	°	+20 tot -40
Centrale kuitsteun hoogte (optie)	mm	120
Centrale comfort beensteun		
Onderbeenlengte (met belast kussen)	mm	385 - 550
Kniehoek*	°	30 - 110
Enkelhoek	°	+20 tot -40
Centrale kuitsteun hoogte	mm	120
Breedte van de zijsteun op centrale kuitsteun	mm	0 - 100
Elektrische centrale beensteun		
Onderbeenlengte (met belast kussen)	mm	365 - 530
Kniehoek*	°	10 - 86
Maximale lengte compensatie	mm	180
Enkelhoek	°	+20 tot -20
Kuitsteun hoogte	mm	90
Kuitsteun breedte	mm	350 - 430
Standaard beensteun (set)		
Onderbeenlengte (met belast kussen)	mm	360 - 530
Kniehoek*	°	70
Enkelhoek	°	0 - 180
Comfort en elektrische beensteun (set)		
Onderbeenlengte (met belast kussen)	mm	360 - 540
Kniehoek*	°	10 - 80
Enkelhoek	°	0 - 180
Kuitsteun hoogte	mm	120
Hoofdsteun		
Hoofdsteun hoogte (geheugen)	mm	170
Hoofdsteun diepte	mm	180
Hoofdsteun verticale hoekverstelling	°	-45 - 45
Hoofdsteun breedte (optie) standaard hoofdsteun	mm	-20 -20
Hoofdsteun breedte (optie) met verstelbare hoofdsteun	mm	-110 -110
Bedieningskasthouder		
Bedieningskasthouder hoogte	mm	60
Bedieningskasthouder diepte	mm	35
Wegzwenkbare bedieningskasthouder		
Bedieningskasthouder hoogte	mm	50
Bedieningskasthouder diepte	mm	35
Bedieningskasthouder hoekverstelling	°	0 - 45
Duwbeugel		
Duwbeugelhoogte	mm	185
Hemiplegie		
Hemiplegie armsteun hoekverstelling (optie)	°	0 - 45
Abductiesteun		

Omschrijving	Eenheid	Waardes
Abductiesteun hoogte	mm	60 - 120
Abductiesteun diepte	mm	60 - 110
Rugpelot		
Rugpelot breedte	mm	-60 - 0
Rugpelot hoogte	mm	200 - 400
Rugpelot diepte	mm	20 - 70

* 0° = benen recht vooruit en 90° = benen in een rechte hoek omlaag

10 Labels

10.1 Aanduidingen op het zitsysteem

Gebruikte symbolen op het zitsysteem (figuur 82):

1. De volledige armsteunen en/of beensteunen zijn niet bedoeld om de rolstoel aan op te tillen.
2. Instellen van het zwaartepunt van het zitsysteem beïnvloedt de stabiliteit van de rolstoel. Deze instelling mag alleen uitgevoerd worden door professionals.

1



2



11 Garantiebepalingen

De garantiebepalingen voor het zitsysteem zijn identiek aan en opgenomen in de handleiding van de rolstoel. ( Rolstoel)

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel. +41 (0)31 958 38 38
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mærkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Dealer/distributeur:

Serienummer:



1011650_OM_Sedeo_Pro_LoRes_
EU_NL_Rev.G_2023-11-13

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr