


Système d'assise

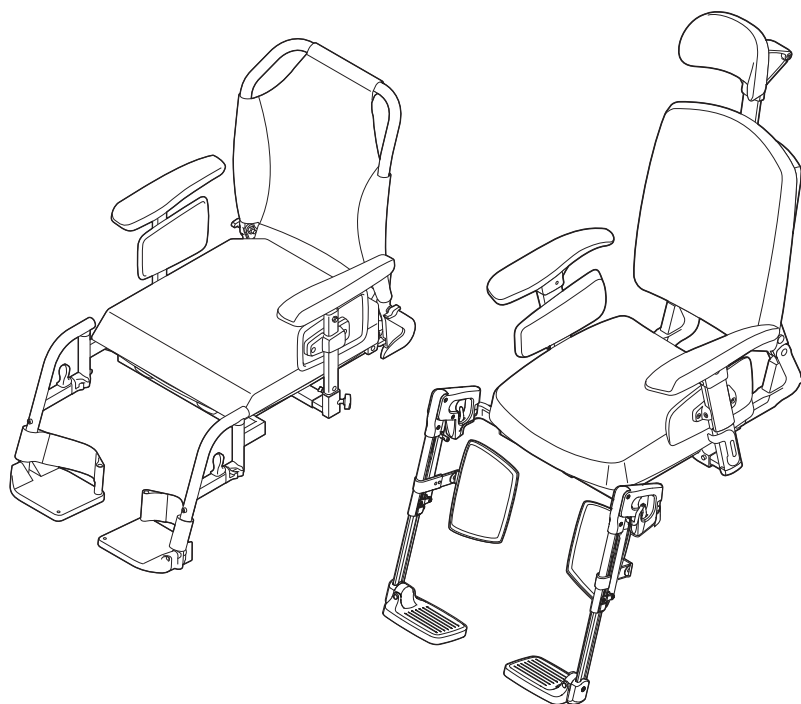

Sedeo Lite / Pro

NOTICE D'UTILISATION

FR

SEDEO

1011652 I

Sedeo Lite	4
Sedeo Pro.....	31

Sedeo Lite

© 2016 Sunrise Medical

Tous droits réservés.

Les informations fournies ne doivent en aucun cas être reproduites et/ou publiées sous quelque forme que ce soit et avec quelque procédé que ce soit (électronique ou mécanique) sans l'autorisation écrite préalable et expresse de Sunrise Medical.

Les informations fournies sont basées sur des données générales relatives aux constructions connues au moment de leur parution. Sunrise Medical mettant en œuvre une politique d'amélioration constante de ses produits, des modifications sont donc sous réserve.

Les informations fournies sont valables pour le produit dans sa version standard. Sunrise Medical décline par conséquent toute responsabilité en cas d'éventuel préjudice découlant de spécifications de produit qui se révéleraient différentes de celles de la version standard. Les illustrations dans ce manuel peuvent différer de la configuration de votre système d'assise.

Bien que les informations disponibles aient été constituées avec tous les soins possibles, Sunrise Medical décline toute responsabilité en cas d'erreurs éventuelles dans ces informations ou de leurs conséquences.

Sunrise Medical décline également toute responsabilité en cas de préjudice découlant de travaux effectués par des tiers.

En vertu de la législation relative à la protection des marques commerciales, les noms d'utilisation, noms commerciaux, marques commerciales etc. appliqués par Sunrise Medical ne doivent pas être considérés comme libres.

Table des matières

1	Introduction.....	6
1.1	Ce manuel utilisateur.....	6
1.2	Pour plus d'informations.....	6
1.3	Symboles utilisés dans ce manuel.....	6
2	Sécurité.....	7
2.1	Température.....	7
2.2	Symboles et étiquettes relatifs à l'assise apposés sur le produit.....	7
3	Description générale.....	8
3.1	Description du système Sedeo Lite.....	8
4	Utilisation.....	9
4.1	Réglage du système d'assise (par l'utilisateur/l'accompagnant).....	9
4.2	Entrer et sortir du fauteuil roulant (transfert vers l'avant).....	10
4.3	Entrer et sortir du fauteuil roulant (transfert vers l'avant).....	10
4.4	Options / accessoires.....	11
5	Ajustements.....	12
5.1	Profondeur d'assise.....	12
5.2	Largeur du siège.....	12
5.3	Angle du dossier.....	13
5.4	Repose-jambe standard.....	13
5.5	Accoudoir.....	14
5.6	Réglage du centre de gravité.....	16
5.7	Appui-tête.....	16
5.8	Support de contrôle fixe/pivotant.....	18
5.9	Fixation de la sangle ventrale.....	19
6	Transport.....	20
6.1	Diminuer la taille du système d'assise pour le transport.....	20
6.2	Installation du système d'assise après le transport.....	22
7	Entretien.....	25
7.1	Nettoyage de l'habillage.....	25
8	Dépannage.....	26
9	Caractéristiques techniques.....	27
9.1	Déclaration de conformité et exigences.....	27
9.2	Informations techniques.....	27
10	Marquage.....	29
10.1	Indications relatives au système d'assise.....	29
11	Dispositions relatives à la garantie.....	30

1 Introduction

1.1 Ce manuel utilisateur

Ce manuel utilisateur vous aidera à utiliser et entretenir votre système d'assise en toute sécurité. Ce manuel utilisateur constitue un complément au manuel général utilisateur fauteuil roulant de Sunrise Medical.

Le cas échéant, ce manuel utilisateur se réfère aux autres manuels, comme précisé ci-dessous.

-  Fauteuil roulant: Renvoie au manuel général utilisateur fauteuil roulant.
-  Boîtier de commande: Renvoie au manuel utilisateur pour le boîtier de commande (applicable uniquement aux fauteuils roulants motorisés).

Veillez lire attentivement ce manuel utilisateur ainsi que les autres manuels utilisateurs avant d'utiliser le produit. Si l'un des manuels utilisateurs n'a pas été fourni avec votre fauteuil roulant, prière de contacter immédiatement votre revendeur. En plus du manuel utilisateur, il existe un manuel d'entretien à l'attention de spécialistes qualifiés.

Si vous souffrez de déficience visuelle, ce document peut être consulté en format pdf sur www.SunriseMedical.eu ou vous être envoyé en grands caractères sur demande.

1.2 Pour plus d'informations

Veillez contacter votre revendeur local autorisé Sunrise Medical si vous avez des questions concernant l'utilisation, l'entretien ou la sécurité de votre fauteuil roulant.

Dans le cas où il n'y a pas revendeur agréé dans votre région ou si vous avez des questions, veuillez contacter Sunrise Medical par écrit ou par téléphone.

Pour des informations sur les notifications sécurité produit et rappels de produits, veuillez consulter www.SunriseMedical.eu

1.3 Symboles utilisés dans ce manuel

Remarque !

Indique d'éventuels problèmes pour l'utilisateur.

⚠ Attention !

Conseil à l'attention de l'utilisateur afin de d'éviter d'endommager le produit.

⚠ Avertissement !

Avertissement à l'attention de l'utilisateur afin de prévenir tout dommage corporel.

Le non-respect de ces instructions peut donner lieu à des dommages corporels, au produit ou à l'environnement !

Symboles dans les illustrations

Chacune des illustrations comporte des icônes et une numérotation pour indiquer les actions à effectuer et dans quel ordre.



Déserrer d'un tour avec l'écrou papillon



Resserrer d'un tour avec l'écrou papillon



Déserrer d'un tour avec la clé torx



Resserrer d'un tour avec la clé torx



Étape 1, 2 etc.

Une flèche dans l'illustration indique que le mouvement du composant concerné s'effectue ou doit être effectué dans le sens indiqué.

2 Sécurité

⚠ Avertissement !

Respectez scrupuleusement les instructions figurant à côté de ces symboles d'avertissement ! Le non-respect de ces instructions peut provoquer des accidents corporels et endommager le fauteuil roulant ou l'environnement ! Dans la mesure du possible, des symboles d'avertissement ont été placés dans les paragraphes adéquats.

Soyez prudent avec les pièces pivotantes et basculantes. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

⚠ Attention !

Les pièces du fauteuil roulant qui sont destinées à être enlevées, pour entretien ou réparation, sans l'utilisation d'outils (par ex. accoudoirs, repose-jambe) peuvent avoir un effet néfaste sur le support de l'utilisateur si elles sont manquantes ou replacées en mauvaise position.

2.1 Température

⚠ Avertissement !


Évitez d'exposer le fauteuil roulant directement au soleil de manière prolongée. Certains éléments du fauteuil roulant, comme le siège, le dossier, les accoudoirs complets peuvent chauffer s'ils sont exposés au soleil trop longtemps. Des brûlures ou une irritation cutanée peuvent en résulter.

2.2 Symboles et étiquettes relatifs à l'assise apposés sur le produit

Les signes, symboles et instructions apposés sur le fauteuil roulant font partie de l'ensemble des mesures de sécurité. Ils ne doivent jamais être recouverts, ni retirés. Ils doivent rester en place et être clairement lisibles tout au long de la durée de vie du fauteuil roulant.

Tout signe, symbole et instruction illisible ou endommagé doit être immédiatement remplacé ou réparé. Pour toute assistance, contactez votre revendeur.

Avertissement! Risque de pincement des doigts

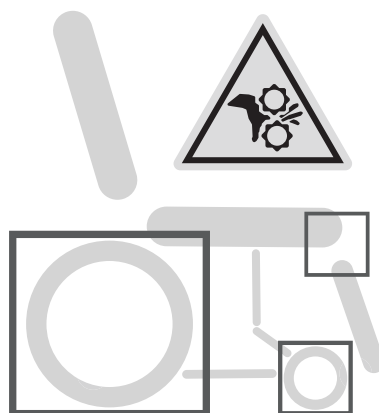

3 Description générale

3.1 Description du système Sedeo Lite

Le fauteuil roulant est équipé d'un système d'assise Sedeo Lite. Le système d'assise Sedeo Lite assure un bon support de la tête, du torse, des bras et des jambes. Un support optimal du corps assure une indépendance maximale à l'utilisateur du fauteuil roulant. Le fauteuil roulant doit être réglé par un spécialiste qualifié. Des réglages incorrects peuvent exercer une influence négative sur la posture assise.

Un certain nombre d'options Sedeo Pro sont également disponibles pour utilisation conjointe avec le système Sedeo Lite. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour des informations plus détaillées, ou consultez notre site www.SunriseMedical.eu

⚠ Attention!

Étudiez attentivement ce manuel avant d'utiliser le système d'assise.

4 Utilisation

4.1 Réglage du système d'assise (par l'utilisateur/l'accompagnant)

Angle au niveau du genou du repose-jambe a élévation manuelle

Remarque !

Les repose-jambes peuvent être ajustés individuellement.

1. Tirez (A) vers vous.
2. (B) remonte. Vous pouvez aussi pousser (B) vers le bas

Remarque !

Maintenez (A) enfoncé.

Déplacement du support de contrôle vers l'intérieur




1. Poussez (A) vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Faites pivoter le support de contrôle vers l'extérieur

1. Poussez (A) vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Remarque !

Le fait de pivoter le support de contrôle vers l'arrière vous permet d'approcher près d'une table. Le contrôleur reste entièrement opérationnel.

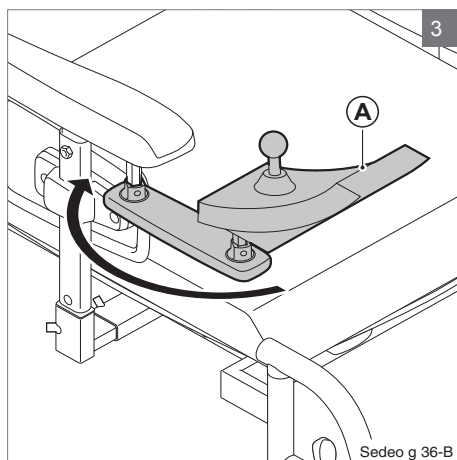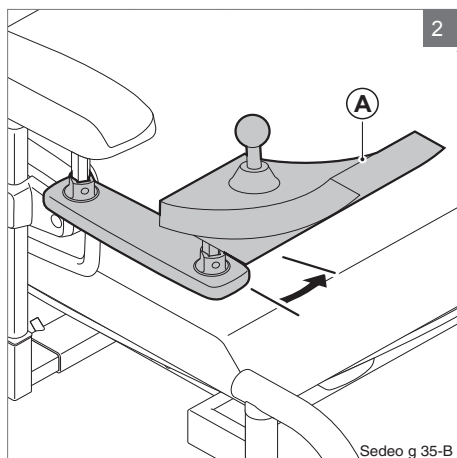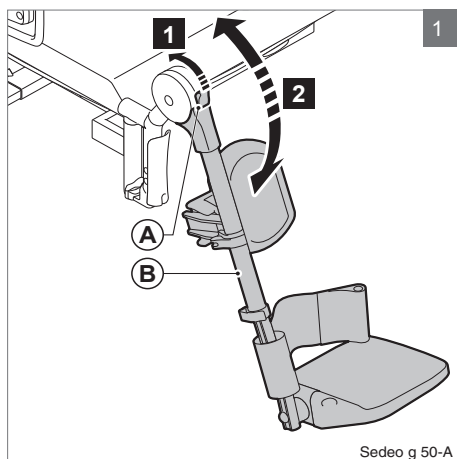


4.2 Entrer et sortir du fauteuil roulant (transfert vers l'avant)

⚠ Avertissement !

Ne montez pas sur les repose-pieds. Placer tout votre poids sur les repose-pieds peut endommager le fauteuil roulant et provoquer des situations dangereuses, notamment le basculement du fauteuil roulant.

Relevez le repose-pied


1. Relevez (A).

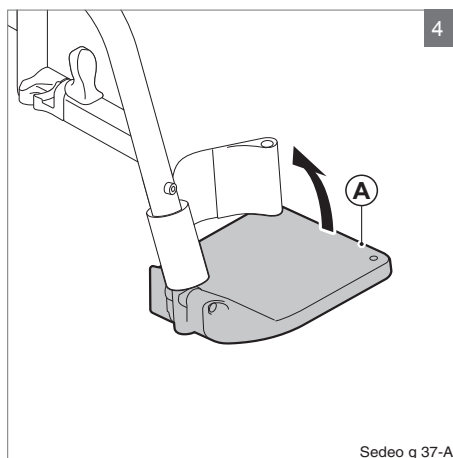

Sedeo g 37-A

Pivoter en arrière et /ou retirer le repose-jambes standard

1. Poussez (A) en avant et maintenir (A) enfoncé.
2. Basculez (B) sur le côté.
3. Enlevez (B).

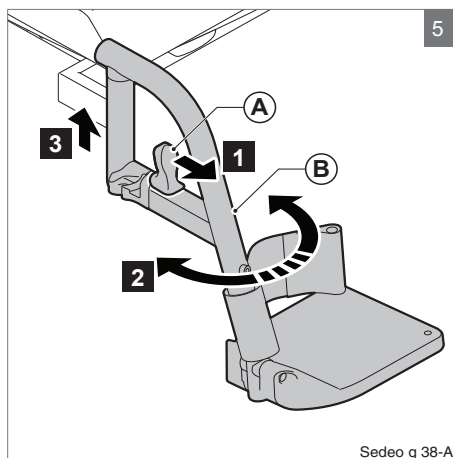

Sedeo g 38-A


4.3 Entrer et sortir du fauteuil roulant (transfert vers l'avant)

Remarque !

Certaines versions du contrôle nécessitent de pivoter sur le côté.

Enlever l'accoudoir

1. Déserrer (A) de deux tours.
2. Enlever (B).

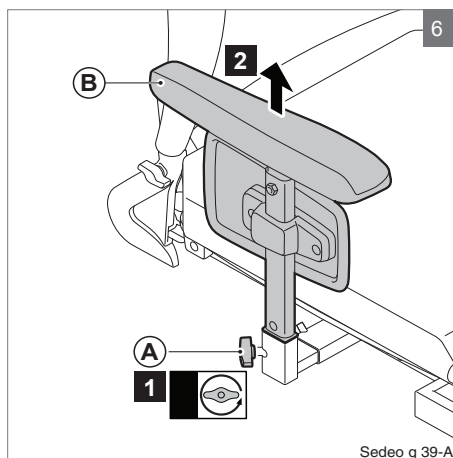

Sedeo g 39-A


4.4 Options / accessoires

Retirer/positionner l'appui-tête

1. Déserez (A) de deux tours.
2. Faites coulisser (B) vers le haut ou le bas.
3. En remettant l'appui-tête en place, serrez (A) de deux tours.

Remarque !

Toujours faire coulisser l'appui-tête jusqu'à ce qu'il s'arrête dans le support.

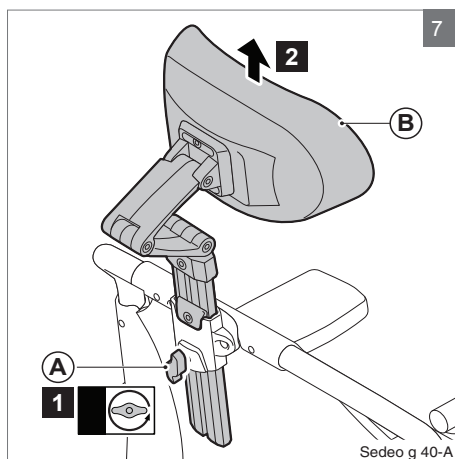

5 Ajustements

L'utilisateur moyen d'un fauteuil roulant n'existe pas. C'est la raison pour laquelle il est possible de régler les systèmes d'assise Sunrise Medical en fonction des besoins particuliers de l'utilisateur.

A cet effet, nous établissons une distinction entre les ajustements du système d'assise et les options de réglage du système d'assise. Les ajustements ne sont effectués qu'une seule fois et doivent être exécutés par des spécialistes qualifiés, sauf indication contraire. Les options de réglage peuvent être effectuées par l'utilisateur. Ces options de réglage n'exigent aucun outil particulier.

5.1 Profondeur d'assise

Réglage du dossier




1. Dévissez (A) complètement et déposez (A).
2. Réglez (B) dans la position voulue.
3. Remettez (A) en place et serrez (A).

Réglage de l'assise

1. Retirez le siège (voir «Utilisation - diminuer la taille du système d'assise pour le transport»).
2. Retirez les vis (B).
3. Déplacez (C) et (D).
4. Serrez les vis (B).
5. Remettez le siège en place voir «Utilisation - Installation du système d'assise après le transport»)


5.2 Largeur du siège

1. Désérrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

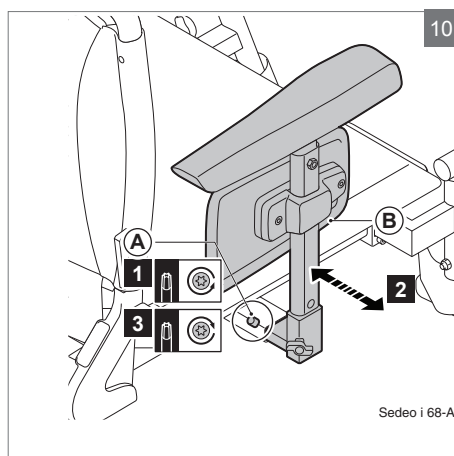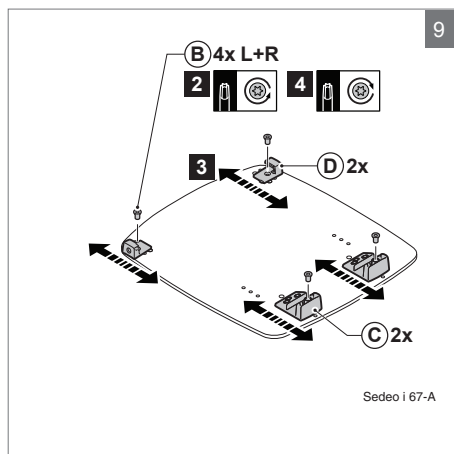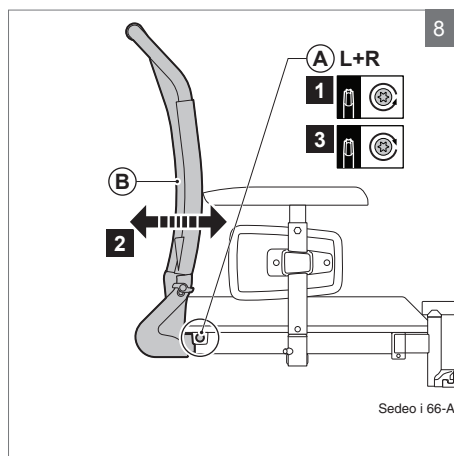


5.3 Angle du dossier

1. Déserrer (A) de deux tours.
2. Soulevez (B) et poussez (B) vers l'avant et vers le bas.

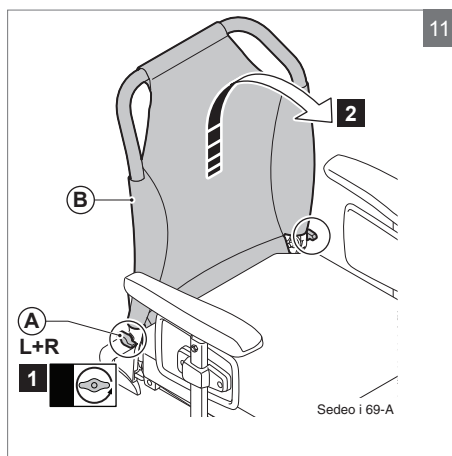


3. Déserrer (A) complètement.
4. Déplacez (A) dans la position voulue.
5. Serrez fermement (A).

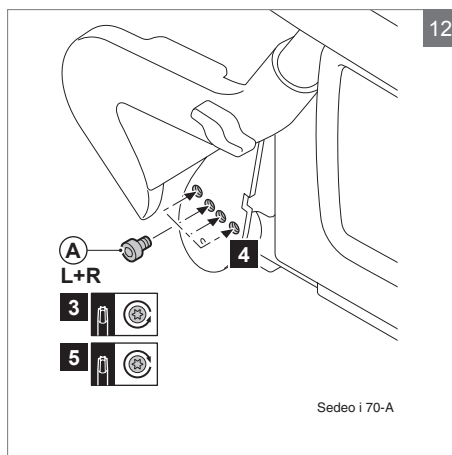

5.4 Repose-jambe standard

Largeur du repose-jambe

1. Déserrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

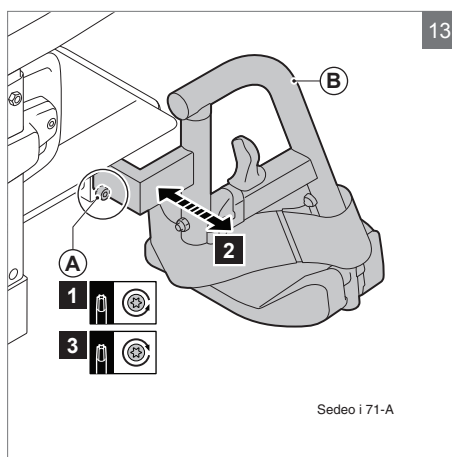


Longueur de jambe plus basse du repose-jambe standard

1. Dévissez (A) complètement et déposez (A).
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Remettez (A) en place et serrez (A).

Remarque !

Vérifiez que l'espace libre est suffisant sous (B) pour que le fauteuil roulant puisse franchir les obstacles.

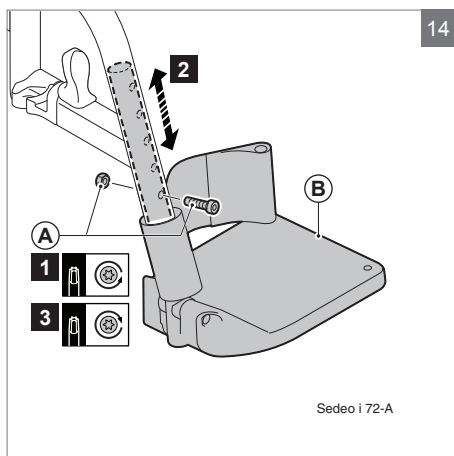


5.5 Accoudoir

Hauteur de l'accoudoir

1. Désérrez (A) d'un tour.
2. Réglez (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).


Remarque !

Vérifiez que les bras sont bien soutenus, sans que les épaules soient poussées vers le haut.

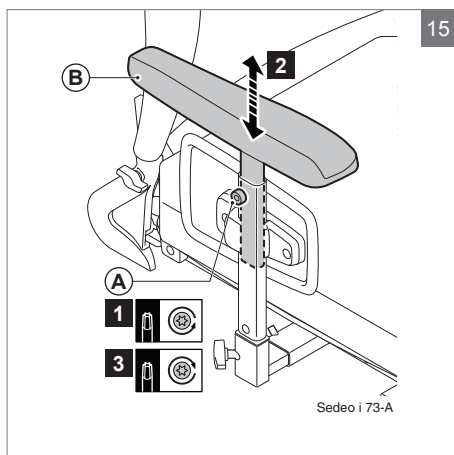


Profondeur de l'accoudoir

1. Désérrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

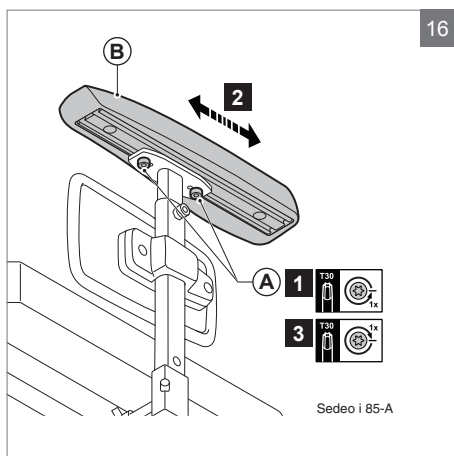


Largeur de l'accoudoir

1. Déserez (A).
2. Enlevez (B)

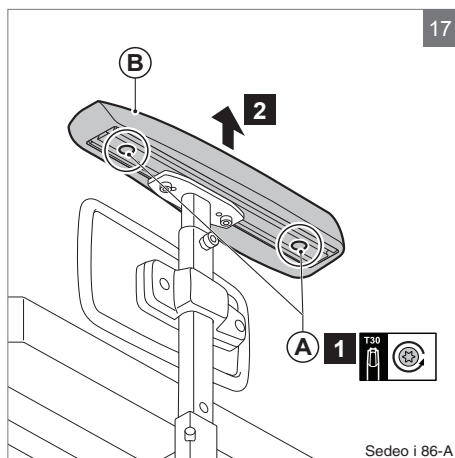


3. Déserez (C) d'un tour.
4. Retirez (D)

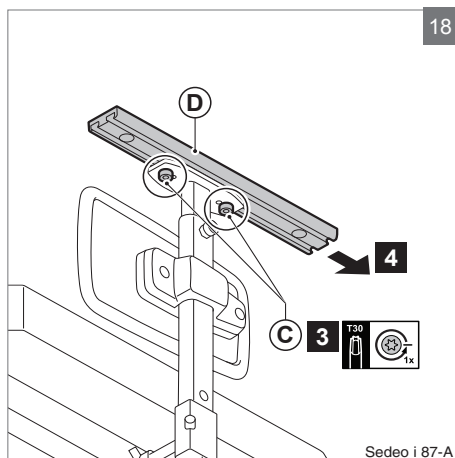**Pour positionner :**

1. Faites glisser simultanément (A) et (B) ou (C) sur (D).


Remarque !

Vérifiez que le cerclage du bloc terminal tombe dans l'ouverture.

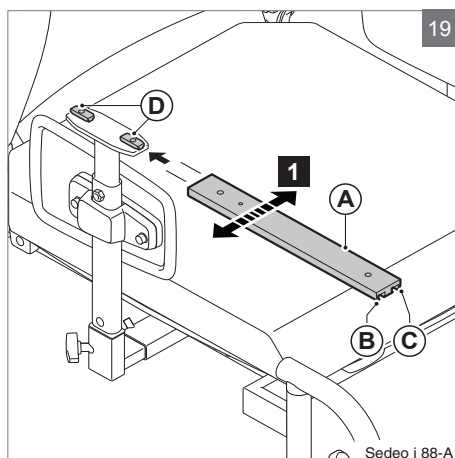


Hauteur du panneau latéral

1. Désérrez les 2 (A) d'un tour.
2. Réglez (B) dans la position voulue.
3. Serrez les deux vis (A)

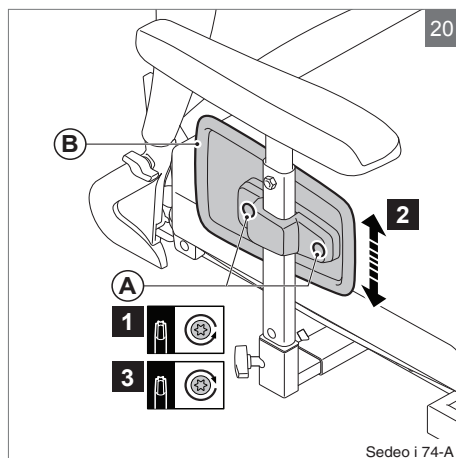
**5.6 Réglage du centre de gravité****⚠ Avertissement !**

La stabilité du fauteuil roulant dépend du réglage du centre de gravité du système d'assise. Ces réglages ne doivent être effectués que par des professionnels.

1. Désérrez les 4 (A) de deux tours.
2. Faites coulisser (B) vers l'avant ou l'arrière.
3. Serrez (A).

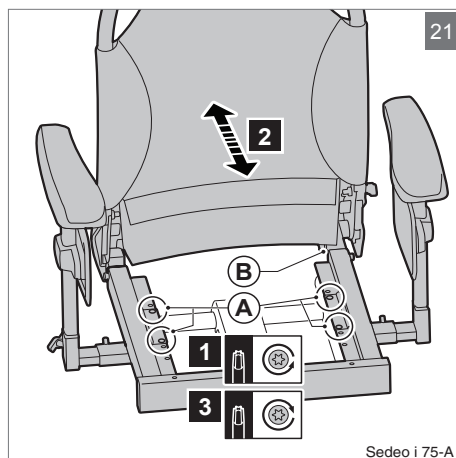
**5.7 Appui-tête****Hauteur de l'appui-tête**

1. Désérrez (A) de deux tours.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A) de deux tours.

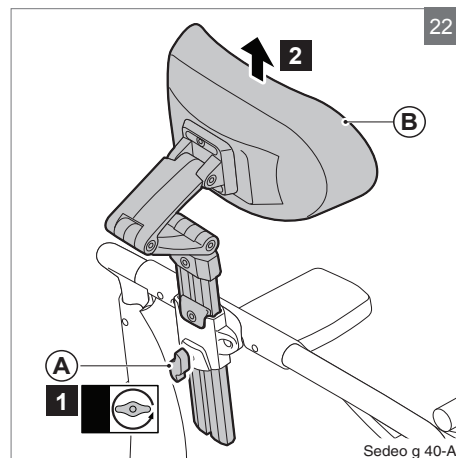

Ajustement du réglage mémorisé


1. Déserez (C) d'un tour.
2. Faites glisser (D) aussi bas que possible.
3. Serrez (C).

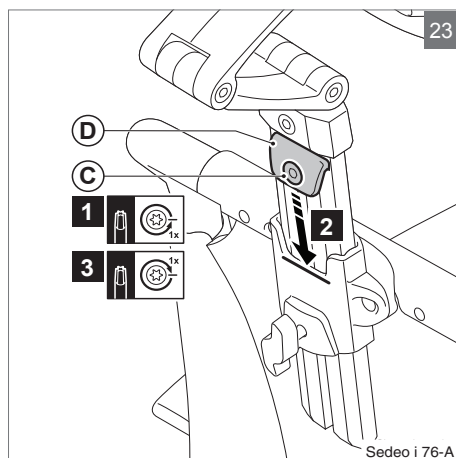**Position de l'appui-tête**


1. Déserez (A) d'un tour.
2. Réglez (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

Remarque !

Corrigez la hauteur de l'appui-tête et inclinez le coussin d'appui-tête selon les besoins.

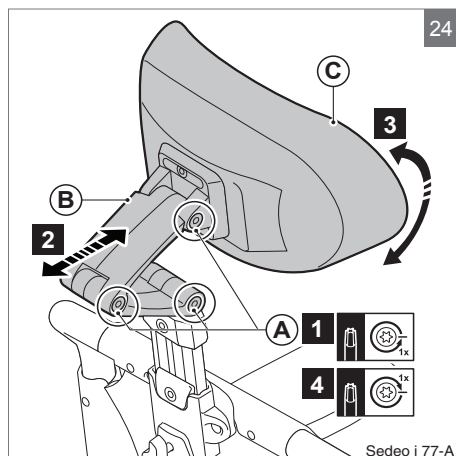**Largeur du coussin d'appui-tête**


1. Déserez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

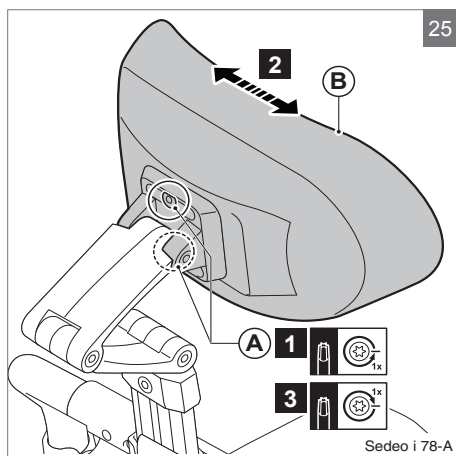

5.8 Support de contrôle fixe/ pivotant


Profondeur

1. Déserrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

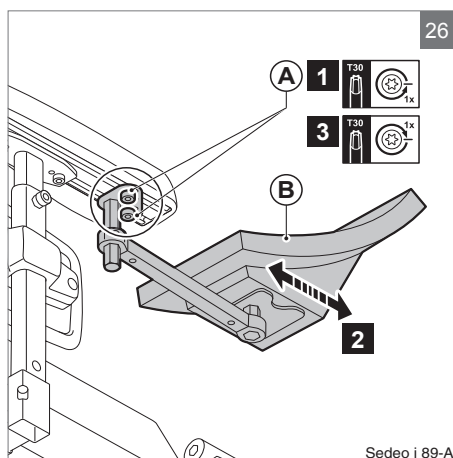


Hauteur (1)

1. Déserrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

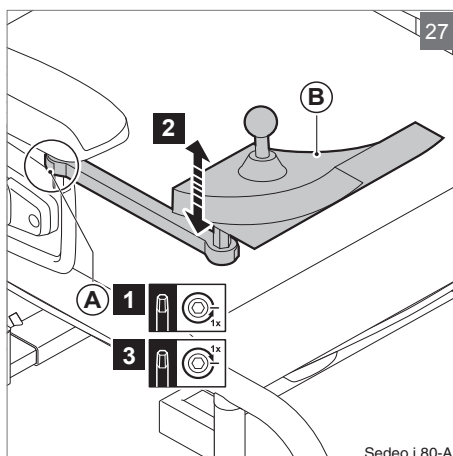


Hauteur (2)

1. Déserrez (C) d'un tour.
2. Faites glisser (D) dans la position voulue.
3. Serrez (C).

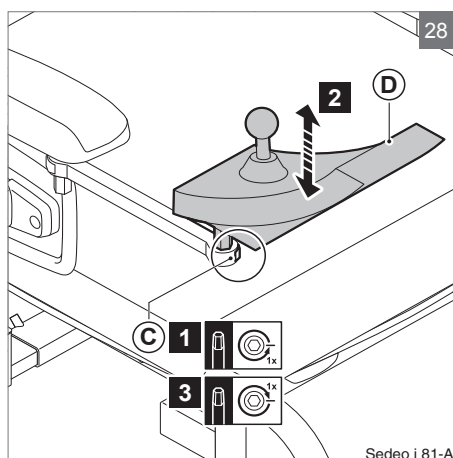

5.9 Fixation de la sangle ventrale

1. Fixez (A) à l'aide de (B) sur le châssis
2. Fixez (B) à l'aide de (C) sur le châssis

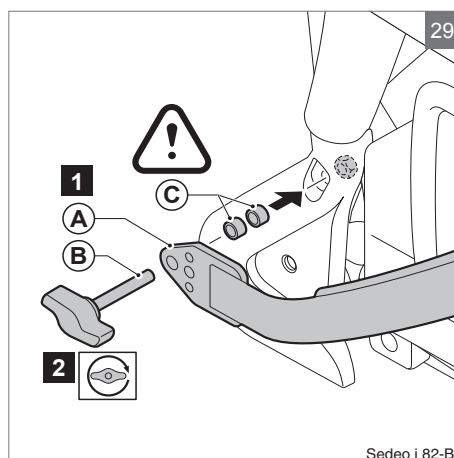

Sedeo i 82-B


⚠ Avertissement !

Vérifiez que la sangle ventrale est ajustée pour l'utilisateur du fauteuil roulant. La sangle doit être ajustée au niveau des hanches, selon un angle de 45° environ.


Vérifiez que la sangle est toujours propre et que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement. La sangle et le mécanisme de verrouillage peuvent être nettoyés avec un chiffon humide.

Si la sangle est positionnée au-dessus des hanches et en travers du ventre de l'utilisateur, une posture d'assise incorrecte peut en résulter et l'utilisateur peut s'affaisser dans le siège.

N'utilisez jamais la sangle ventrale comme ceinture de sécurité lors du transport.

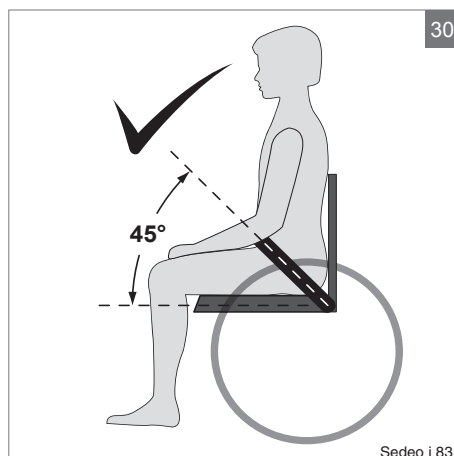

Sedeo i 83

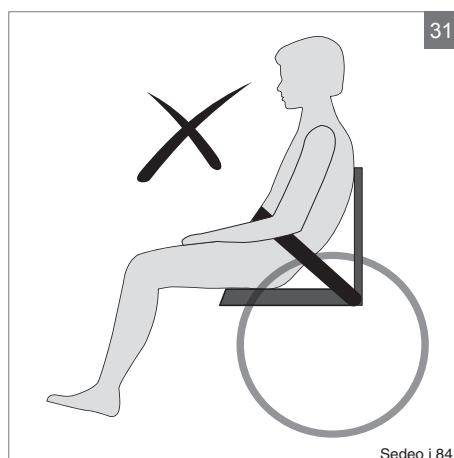

Sedeo i 84

6 Transport


6.1 Diminuer la taille du système d'assise pour le transport

Les pièces qui peuvent être facilement démontées doivent être enlevées pour le transport (figure 32)

- A. Assise (0,5 kg)
- B. Dossier
- C. Accoudoir (1,8 kg)
- D. Repose-jambe (1,2 kg)
- E. Appui-tête (1,3 kg)


⚠ Avertissement!

La taille du fauteuil roulant peut être diminuée pour le transport lorsqu'il est inoccupé. Tous les composants du système d'assise qui sont facilement détachables doivent être retirés. Rangez ces composants en lieu sûr afin qu'ils ne provoquent ni blessure ni dégâts et qu'ils ne soient pas endommagés.

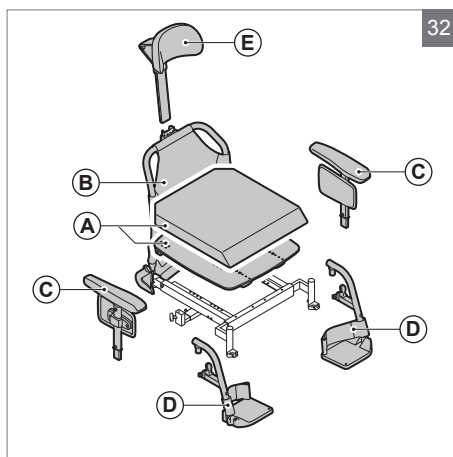


Dépose du siège (figures 33 et 34)

1. Sortez (A) de la plaque.

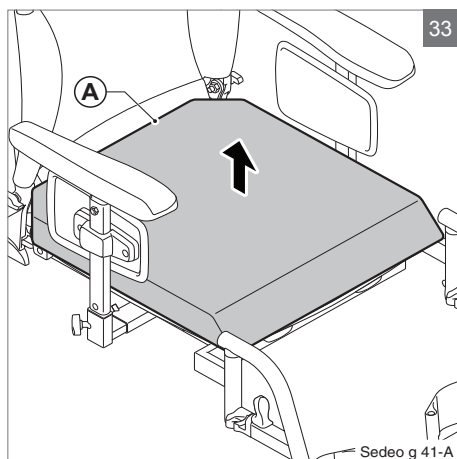

2. Tirez (B) vers le haut et vers l'avant.

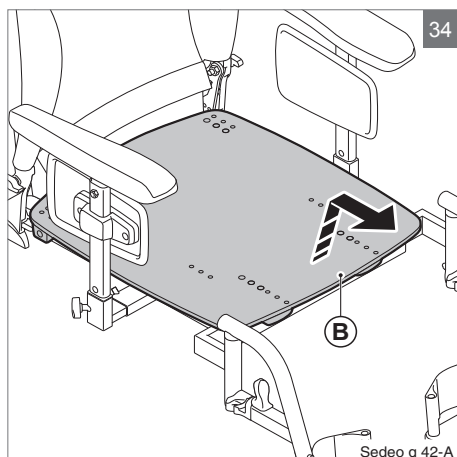
**Repli complet du dossier vers l'avant (figure 35)**

1. Déserrez (A) de deux tours.

Remarque!
Ne retirez pas (A).


2. Soulevez (B) et poussez (B) vers l'avant et vers le bas.

Remarque!
Au besoin, retirez préalablement les accoudoirs.

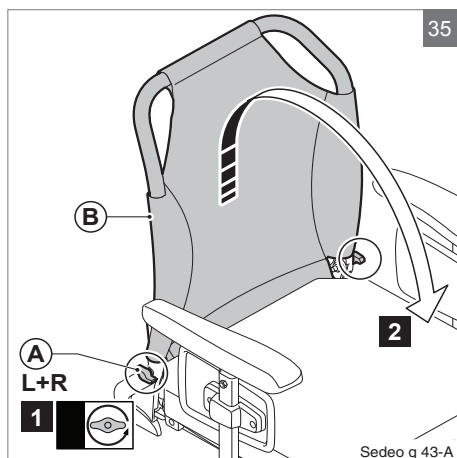


Dépose des repose-jambes standard (figure 36)

1. Poussez (A) en avant et maintenez (A) enfoncé.
2. Basculez (B) sur le côté.
3. Enlevez (B).

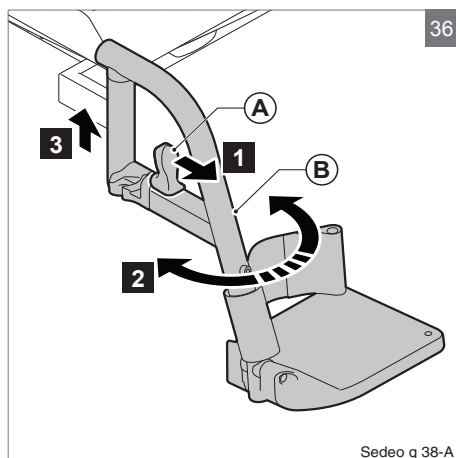

Enlevez l'accoudoir (figure 37)


1. Déserrez (A) d'un tour.
2. Enlevez (B).

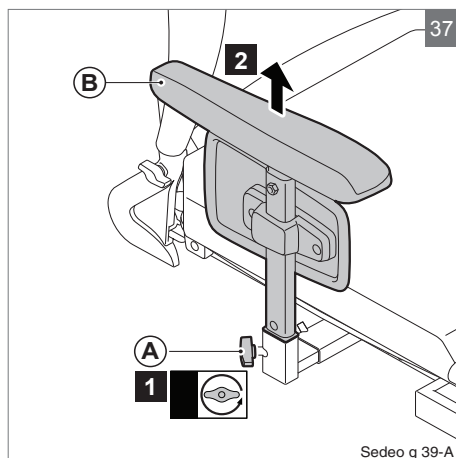

6.2 Installation du système d'assise après le transport

Positionnement de l'accoudoir (figure 38)

1. Faites coulisser (A) sur (B).
2. Serrez (C).

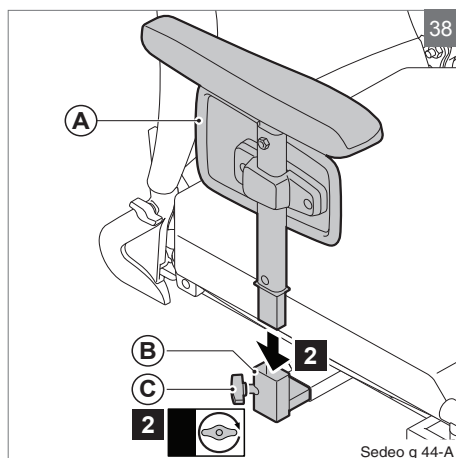


Positionnement des repose-jambes standard (figure 39)

1. Faites coulisser (A) complètement dans (B).
2. Pivotez (A) vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


⚠ Avertissement!

Après avoir entendu le clic, le repose-jambes est verrouillé en place.

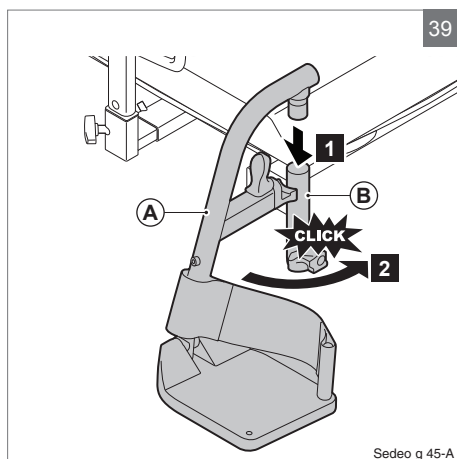

Positionnement du dossier pour utilisation (figure 40)

1. Inclinez (A) en arrière et poussez (A) vers le bas.
2. Serrez (B).

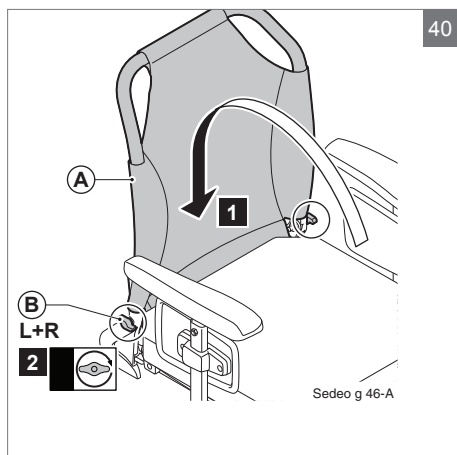


Positionnement du siège (figures 41 en 42)


1. Faites coulisser (A) et (B) sur (C) et (D).
2. Poussez (E) vers le bas.

⚠ Attention!

Veillez à ce que (C) et (D) au dos du siège s'accrochent sous les têtes de boulon.

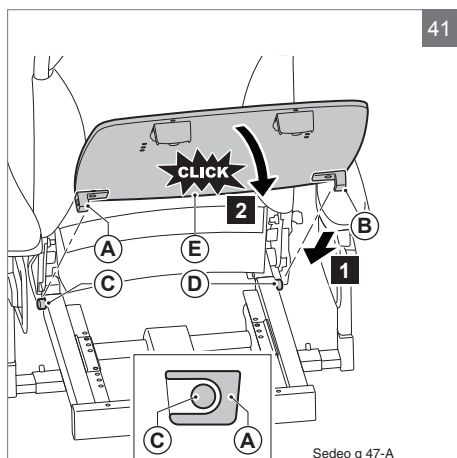

3. Positionnez (A) sur (B).

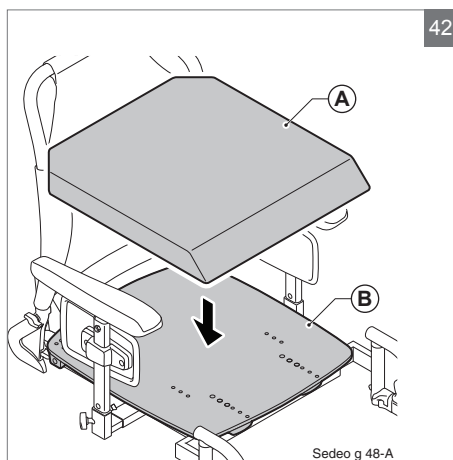

7 Entretien

Il est conseillé de faire entretenir votre fauteuil roulant au moins une fois par an, ou en cas d'utilisation intensive, une fois tous les six mois par votre revendeur.

7.1 Nettoyage de l'habillage

Nettoyez l'habillage du fauteuil avec un chiffon humide et du savon ménager. Séchez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Pièces en PU

Nettoyez les accoudoirs, les coussins latéraux etc. avec un chiffon humide et du savon ménager. Séchez ensuite les pièces avec un chiffon doux.

Habillage du siège et du dossier

Suivez les instructions de lavage des housses (voir la figure 43).

⚠ Avertissement!

N'utilisez pas de solvants organiques tels que diluants, benzène ou white spirit.

Ne nettoyez pas l'habillage par une méthode chimique. Ne repassez pas l'habillage et ne le faites pas sécher en machine.

43



Stoff / Material:
100% Polyamid
Skum / Foam:
100% Polyurethane

Str./Size

45X45

8 Dépannage

En cas de problème avec le système d'assise, contactez votre revendeur.

9 Caractéristiques techniques

9.1 Déclaration de conformité et exigences

1. EN-ISO 10993-5 (1999-11) Évaluation biologique des appareils médicaux.
2. EN 1021 1,2 Évaluation de l'inflammabilité du mobilier revêtu. Source d'inflammation : équivalent d'une cigarette/flamme d'allumette.

9.2 Informations techniques

Description	Unité	Valeur
Système d'assise		
Poids de l'utilisateur	kg	136
Largeur du siège	mm	400 - 510
Profondeur d'assise	mm	420 / 440 / 460 / 480 / 500
Centre de gravité	mm	0 / 20 / 40 / 60
Siège		
Position du coussin de siège en profondeur	mm	-20 / 0 / +20
Dossier		
Hauteur du dossier	mm	480
Angle du dossier	°	92 / 97 / 102 / 107
Accoudoir		
Largeur du coussin d'accoudoir	mm	-20 / 0 par côté
Hauteur du coussin d'accoudoir	mm	170 - 290
Profondeur du coussin d'accoudoir	mm	80
Repose-jambe standard (ensemble)		
Longueur inférieure de la jambe (avec siège comprimé)	mm	360 - 460
Angle au niveau du genou*	°	70
Repose-jambe relevant (ensemble)		
Longueur inférieure de la jambe (avec siège comprimé)	mm	360 - 530
Angle au niveau du genou*	°	10 - 75
Angle au niveau de la cheville	°	0 - 180
Largeur du coussin de mollet	mm	50
Hauteur du coussin de mollet	mm	250
Profondeur du coussin de mollet	mm	50

Description	Unité	Valeur
Angle de support du mollet (souple)	°	0 - 25
Appui-tête		
Hauteur de l'appui-tête (mémorisée)	mm	170
Profondeur de l'appui-tête	mm	180
Angle vertical de l'appui-tête	°	45 - 45
Support de contrôle		
Hauteur du support de contrôle	mm	60
Profondeur du support de contrôle	mm	35
Pivotement du support de contrôle		
Hauteur du support de contrôle	mm	50
Profondeur du support de contrôle	mm	35
Angle de positionnement du contrôle	°	é

* = 0 ° jambes droit devant et 90 ° = jambes dans un angle droit vers le bas

10 Marquage

10.1 Indications relatives au système d'assise

Marques utilisées sur le système d'assise (figure 44) :

10. Le fauteuil roulant ne doit pas être soulevé par les accoudoirs, en entier et/ou par les repose-jambes.
11. La stabilité du fauteuil roulant dépend du réglage du centre de gravité du système d'assise. Ces réglages ne doivent être effectués que par des professionnels.

1



44

2



11 Dispositions relatives à la garantie

Les dispositions et les responsabilités relatives à la garantie applicable au système d'assise sont identiques à celles intégrées dans le manuel du fauteuil roulant.

( Fauteuil roulant)

Sedeo Pro

© 2016 Sunrise Medical

Tous droits réservés.

Les informations fournies ne doivent en aucun cas être reproduites et/ou publiées sous quelque forme que ce soit et avec quelque procédé que ce soit (électronique ou mécanique) sans l'autorisation écrite préalable et expresse de Sunrise Medical.

Les informations fournies sont basées sur des données générales relatives aux constructions connues au moment de leur parution. Sunrise Medical mettant en œuvre une politique d'amélioration constante de ses produits, des modifications sont donc sous réserve.

Les informations fournies sont valables pour le produit dans sa version standard. Sunrise Medical décline par conséquent toute responsabilité en cas d'éventuel préjudice découlant de spécifications de produit qui se révéleraient différentes de celles de la version standard. Les illustrations dans ce manuel peuvent différer de la configuration de votre système d'assise.

Bien que les informations disponibles aient été constituées avec tous les soins possibles, Sunrise Medical décline toute responsabilité en cas d'erreurs éventuelles dans ces informations ou de leurs conséquences.

Sunrise Medical décline également toute responsabilité en cas de préjudice découlant de travaux effectués par des tiers.

En vertu de la législation relative à la protection des marques commerciales, les noms d'utilisation, noms commerciaux, marques commerciales etc. appliqués par Sunrise Medical ne doivent pas être considérés comme libres.

Table des matières

1	Introduction.....	34
1.1	Ce manuel utilisateur	34
1.2	Pour plus d'informations	34
1.3	Symboles utilisés dans ce manuel	34
2	Sécurité.....	35
2.1	Température	35
2.2	Symboles et étiquettes relatifs à l'assise apposés sur le produit	35
3	Description générale.....	36
3.1	Description du produit Sedeo Pro	36
4	Utilisation.....	37
4.1	Réglage du système d'assise (par l'utilisateur/l'accompagnant)	37
4.2	Entrer et sortir du fauteuil roulant (transfert vers l'avant)	40
4.4	Entrer et sortir du fauteuil roulant (transfert latéral)	41
4.5	Options / accessoires	41
5	Ajustements.....	43
5.1	Profondeur d'assise	43
5.2	Largeur du siège	43
5.3	Angle du dossier	44
5.4	Hauteur du dossier	44
5.5	Repose-jambe standard ou à montée manuelle	44
5.6	Repose pieds (pour petites et grandes largeurs d'assise)	45
5.7	Repose jambes confort	46
5.8	Repose-jambe central	46
5.9	Repose-jambe central	47
5.10	Accoudoir	49
5.11	Réglage du centre de gravité	53
5.12	Appui-tête	53
5.13	Support de contrôle fixe/pivotant	54
5.14	Support d'abduction	55
5.15	Dossier avec sangles réglables - souple	56
5.16	Support thoracique	56
5.17	Support de cuisse	57
5.18	Fixation de la sangle ventrale	58
5.19	Dossier passager	59
6	Transport.....	60
6.1	Diminuer la taille du système d'assise pour le transport	60
6.2	Installation du système d'assise après le transport	62
7	Entretien.....	64
7.1	Nettoyage de l'habillage	64
8	Dépannage.....	65

9	Caractéristiques techniques	66
9.1	Déclaration de conformité et exigences	66
9.2	Informations techniques	66
10	Marquage	69
10.1	Indications relatives au système d'assise	69
11	Dispositions relatives à la garantie	70

1 Introduction

1.1 Ce manuel utilisateur

Ce manuel utilisateur vous aidera à utiliser et entretenir votre système d'assise en toute sécurité. Ce manuel utilisateur constitue un complément au manuel général utilisateur fauteuil roulant de Sunrise Medical.

Le cas échéant, ce manuel utilisateur se réfère aux autres manuels, comme précisé ci-dessous.

-  Fauteuil roulant: Renvoie au manuel général utilisateur fauteuil roulant.
-  Boîtier de commande: Renvoie au manuel utilisateur pour le boîtier de commande (applicable uniquement aux fauteuils roulants motorisés).

Veillez lire attentivement ce manuel utilisateur ainsi que les autres manuels utilisateurs avant d'utiliser le produit. Si l'un des manuels utilisateurs n'a pas été fourni avec votre fauteuil roulant, prière de contacter immédiatement votre revendeur. En plus du manuel utilisateur, il existe un manuel d'entretien à l'attention de spécialistes qualifiés.

Si vous souffrez de déficience visuelle, ce document peut être consulté en format pdf sur www.SunriseMedical.eu ou vous être envoyé en grands caractères sur demande.

1.2 Pour plus d'informations

Veillez contacter votre revendeur local autorisé Sunrise Medical si vous avez des questions concernant l'utilisation, l'entretien ou la sécurité de votre fauteuil roulant.

Dans le cas où il n'y a pas revendeur agréé dans votre région ou si vous avez des questions, veuillez contacter Sunrise Medical par écrit ou par téléphone.

Pour des informations sur les notifications sécurité produit et rappels de produits, veuillez consulter www.SunriseMedical.eu

1.3 Symboles utilisés dans ce manuel

Remarque !

Indique d'éventuels problèmes pour l'utilisateur.

⚠ Attention !

Conseil à l'attention de l'utilisateur afin de d'éviter d'endommager le produit.

⚠ Avertissement !

Avertissement à l'attention de l'utilisateur afin de prévenir tout dommage corporel.

Le non-respect de ces instructions peut donner lieu à des dommages corporels, au produit ou à l'environnement !

Symboles dans les illustrations

Chacune des illustrations comporte des icônes et une numérotation pour indiquer les actions à effectuer et dans quel ordre.



Déserrer d'un tour avec l'écrou papillon



Resserrer d'un tour avec l'écrou papillon



Déserrer d'un tour avec la clé torx



Resserrer d'un tour avec la clé torx



Étape 1, 2 etc.

Une flèche dans l'illustration indique que le mouvement du composant concerné s'effectue ou doit être effectué dans le sens indiqué.

2 Sécurité

⚠ Avertissement !

Respectez scrupuleusement les instructions figurant à côté de ces symboles d'avertissement ! Le non-respect de ces instructions peut provoquer des accidents corporels et endommager le fauteuil roulant ou l'environnement ! Dans la mesure du possible, des symboles d'avertissement ont été placés dans les paragraphes adéquats.

Soyez prudent avec les pièces pivotantes et basculantes. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

⚠ Attention !

Les pièces du fauteuil roulant qui sont destinées à être enlevées, pour entretien ou réparation, sans l'utilisation d'outils (par ex. accoudoirs, repose-jambe) peuvent avoir un effet néfaste sur le support de l'utilisateur si elles sont manquantes ou replacées en mauvaise position.

2.1 Température

⚠ Avertissement !


Évitez d'exposer le fauteuil roulant directement au soleil de manière prolongée. Certains éléments du fauteuil roulant, comme le siège, le dossier, les accoudoirs complets peuvent chauffer s'ils sont exposés au soleil trop longtemps. Des brûlures ou une irritation cutanée peuvent en résulter.

2.2 Symboles et étiquettes relatifs à l'assise apposés sur le produit

Les signes, symboles et instructions apposés sur le fauteuil roulant font partie de l'ensemble des mesures de sécurité. Ils ne doivent jamais être recouverts, ni retirés. Ils doivent rester en place et être clairement lisibles tout au long de la durée de vie du fauteuil roulant.

Tout signe, symbole et instruction illisible ou endommagé doit être immédiatement remplacé ou réparé. Pour toute assistance, contactez votre revendeur.

Avertissement! Risque de pincement des doigts

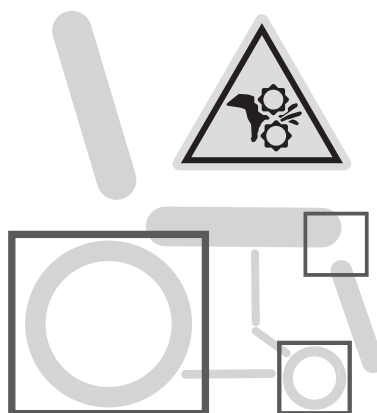

3 Description générale

3.1 Description du produit Sedeo Pro

Le fauteuil roulant est équipé d'un système d'assise Sedeo Pro. Le système d'assise Sedeo Pro assure un bon support de la tête, du torse, des bras et des jambes. Un support optimal du corps assure une indépendance maximale à l'utilisateur du fauteuil roulant.

Le fauteuil roulant doit être réglé par un spécialiste qualifié. Des réglages incorrects peuvent exercer une influence négative sur la posture assise.

⚠ Attention!


Étudiez attentivement ce manuel avant d'utiliser le système d'assise.

Outils fournis

Une clé Torx T30 est fournie avec le système d'assise. Un professionnel peut l'utiliser pour ajuster tous les réglages du système d'assise. La clé Torx T30 (A) se trouve sur le châssis, à l'emplacement indiqué dans la figure 1.

⚠ Remarque!

Différentes parties du système d'assise portent des repères d'étalonnage. Les réglages d'usine sont indiqués.

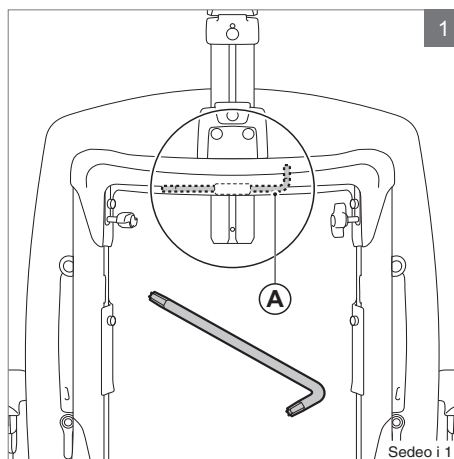

4 Utilisation

4.1 Réglage du système d'assise (par l'utilisateur/l'accompagnant)


Inclinaison manuelle du dossier (par l'accompagnant)

1. Appuyez sur (A).
2. Réglez (B) dans la position voulue.

Remarque !

Continuez à appuyer sur (A).

3. Relâchez (A).

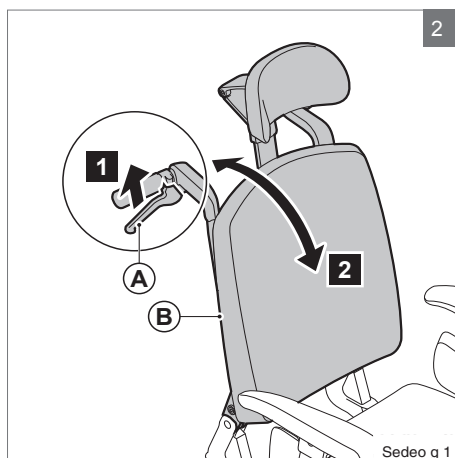


Inclinaison manuelle du dossier (par l'utilisateur)

1. Appuyez sur (A).
2. Penchez-vous en avant ou en arrière pour régler (B) dans la position voulue.

Remarque !

Continuez à appuyer sur (A).


3. Relâchez (A).

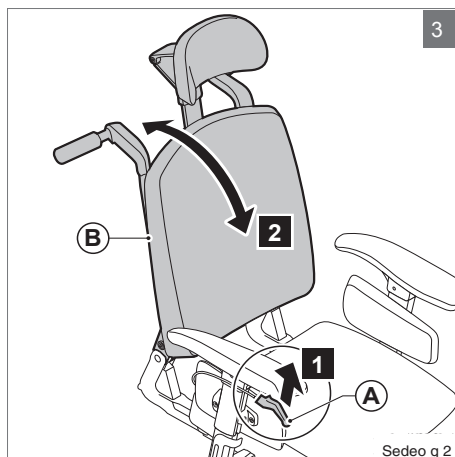

Repose-jambes confort, angle du genou


Les repose-jambes confort sont indépendants l'un de l'autre quant à l'inclinaison.

1. Poussez la poignée (B) vers l'avant.
2. Allongez votre jambe.
3. Lâchez la poignée à la position souhaitée.

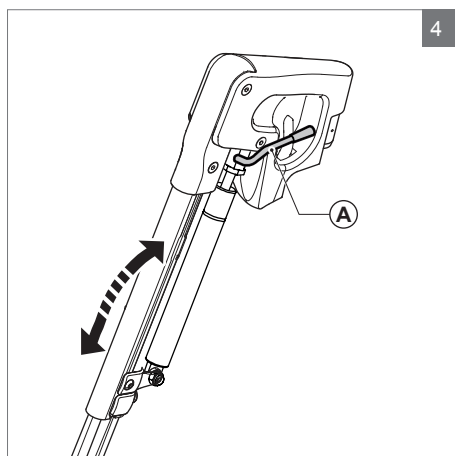

Angle au niveau du genou du repose-jambe central à élévation manuelle


1. Désérrez (A) d'un quart de tour.
2. Réglez (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

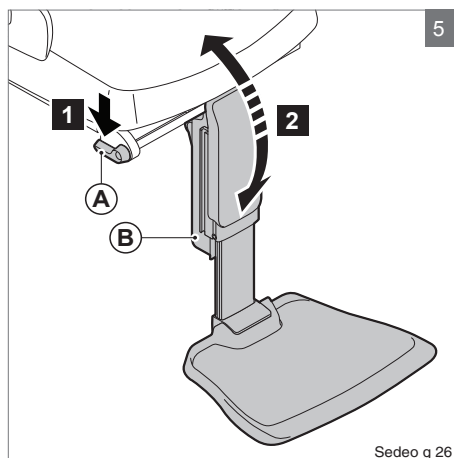

Sedeo g 26

Déplacement du support de contrôle vers l'intérieur

1. Poussez (A) vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

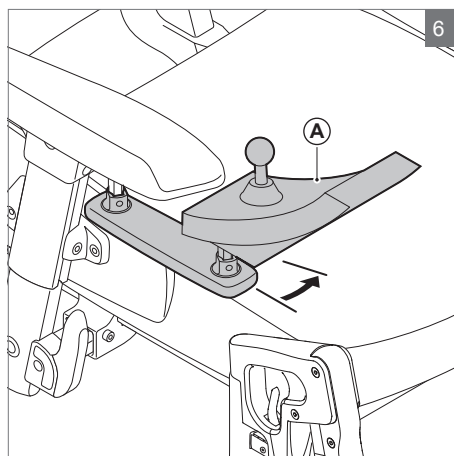


Faites pivoter le support de contrôle vers l'extérieur

1. Poussez (A) vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


Remarque !

Le fait de pivoter le support de contrôle vers l'arrière vous permet d'approcher près d'une table. Le contrôleur reste entièrement opérationnel.

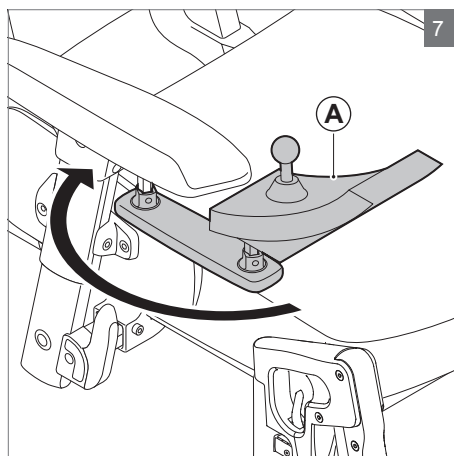

Hauteur de la poignée poussoir

1. Déserez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

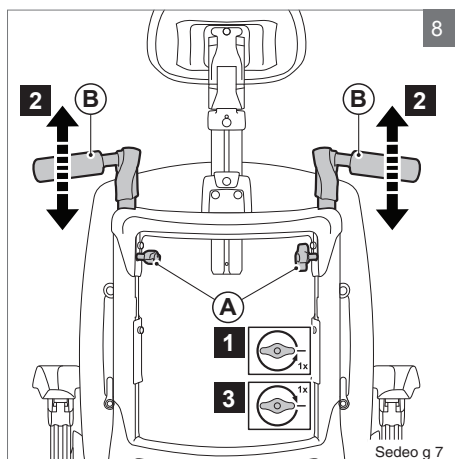


Barre poussoir à angle réglable

1. Déserez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

⚠ Avertissement !

N'utilisez pas la barre poussoir pour incliner l'ensemble du fauteuil en arrière (pour monter sur un trottoir, par exemple). La barre poussoir n'est pas conçue pour ce type d'utilisation.

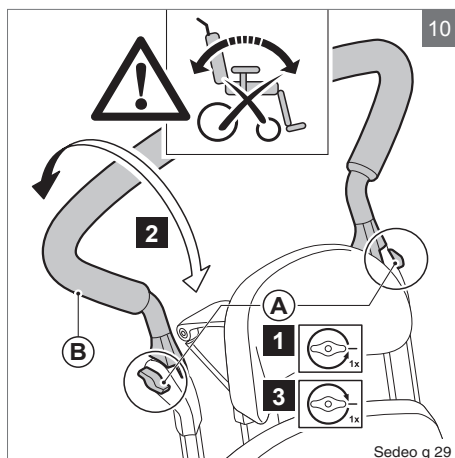


Accoudoir pour hémiplégique

1. Tirez (A) hors de sa position verrouillée et tournez (B) dans la position voulue.

Remarque !

Vérifiez que (B) est bien fixé !

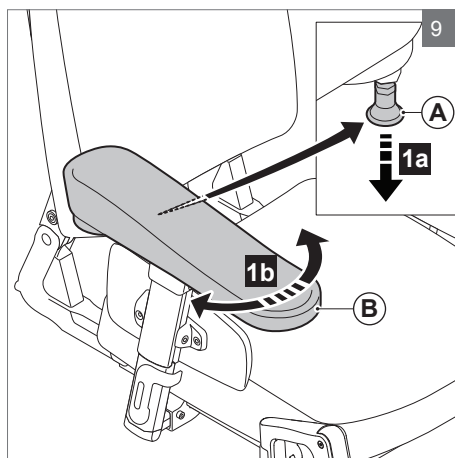

4.2 Entrer et sortir du fauteuil roulant (transfert vers l'avant)

⚠ Avertissement !


Ne montez pas sur les repose-pieds. Placer tout votre poids sur les repose-pieds peut endommager le fauteuil roulant et provoquer des situations dangereuses, notamment le basculement du fauteuil roulant.

Repose-jambe standard

1. Pliez le repose-pied (A) vers le haut
2. Basculez les plaques pour mollets (B vers le côté (le cas échéant)
3. Si possible, poussez (C) vers l'arrière et basculez l'appuijambes (D) vers le côté
4. Asseyez-vous dans le fauteuil

Relever le repose-pied central du repose-jambe


1. Relevez (A).

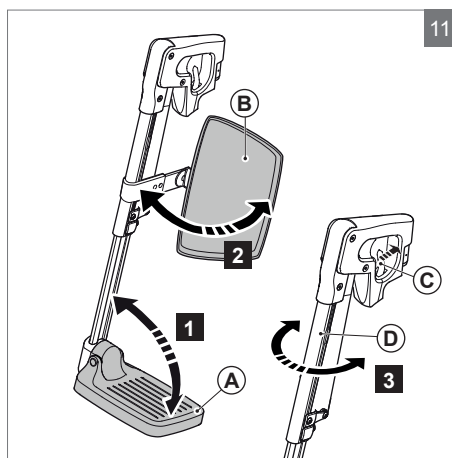

Sedeo g 14

Relever les repose-pieds du repose-jambes central électrique

1. Relevez (A).

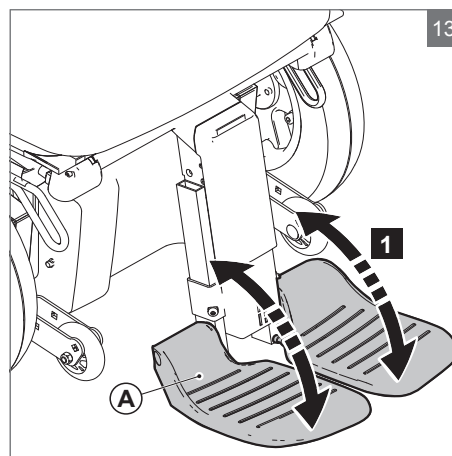

4.3


4.4 Entrer et sortir du fauteuil roulant (transfert latéral)

Remarque !

Certaines versions du contrôle nécessitent de pivoter sur le côté.

Enlevez l'accoudoir

1. Basculez (A) vers le bas.
2. Enlevez (B).

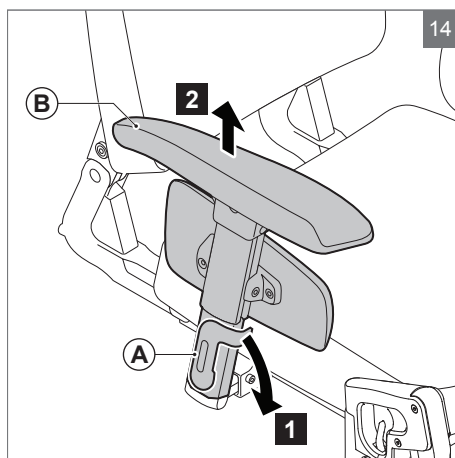

Replier l'accoudoir


1. Appuyez sur (A).
2. Basculez (B) en arrière.

⚠ Attention !

Retirez le plateau avant de replier l'accoudoir.

⚠ Avertissement !

Ne vous appuyez pas sur l'accoudoir replié.

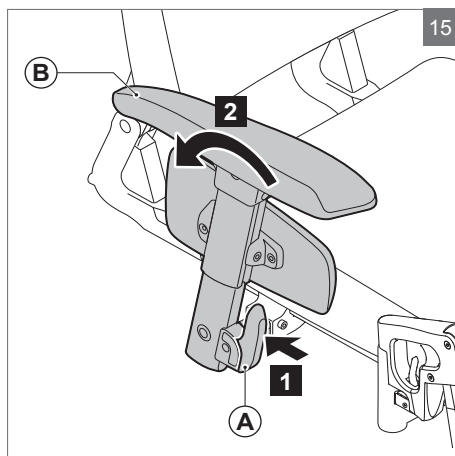


4.5 Options / accessoires

Retirer/positionner l'appui-tête

1. Soulevez (A).
2. Faites glisser (B) hors ou dans (C).
3. Poussez (A) vers le bas.

Remarque !

Toujours faire coulisser l'appui-tête jusqu'à ce qu'il s'arrête dans le support.

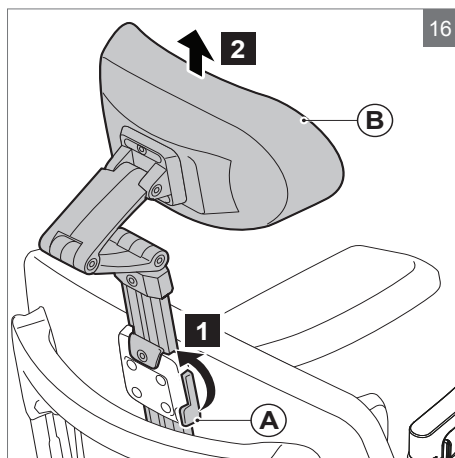

Pivoter le support d'abduction vers le bas


1. Sortez (A) de sa position verrouillée et pivotez (B) vers le bas
2. Relâchez (A).

Pivoter le support d'abduction vers le haut


3. Sortez (A) de sa position verrouillée et pivotez (B) vers le bas
4. Relâchez (A) en position verrouillée.

Remarque !


Vérifiez que (B) est bien fixé !

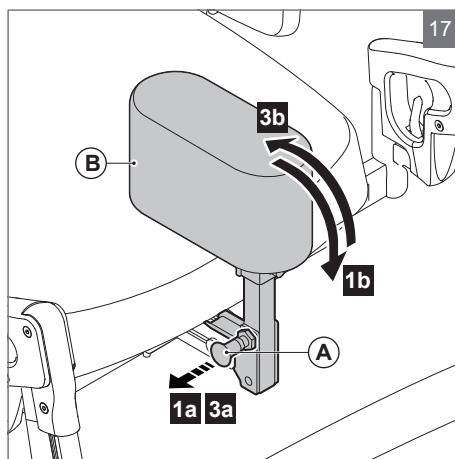**Replier le support thoracique**

1. Appuyez sur (A) pour replier (B).

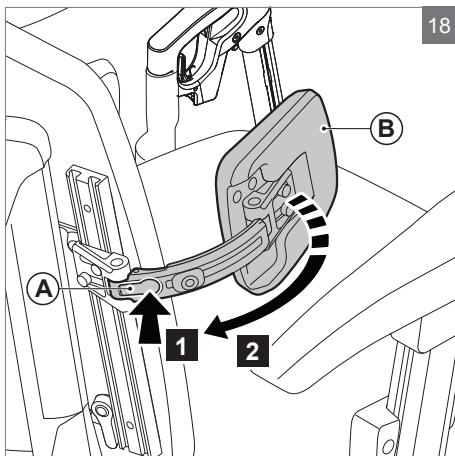**Retirer le support de cuisse**

1. Déserez (A) d'un tour.
2. Enlevez (B).

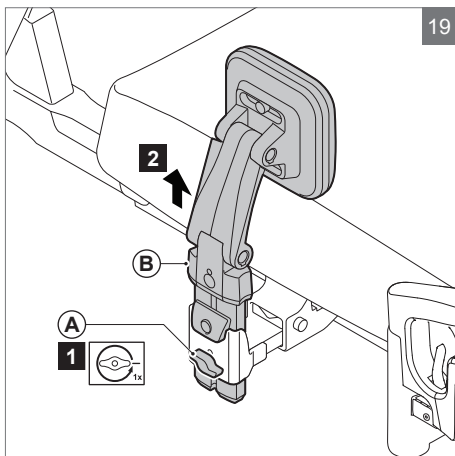

5 Ajustements

L'utilisateur moyen d'un fauteuil roulant n'existe pas. C'est la raison pour laquelle il est possible de régler les systèmes d'assise Sunrise Medical en fonction des besoins particuliers de l'utilisateur.

A cet effet, nous établissons une distinction entre les ajustements du système d'assise et les options de réglage du système d'assise. Les ajustements ne sont effectués qu'une seule fois et doivent être exécutés par des spécialistes qualifiés, sauf indication contraire. Les options de réglage peuvent être effectuées par l'utilisateur. Ces options de réglage n'exigent aucun outil particulier.

Remarque !

Différentes parties du système d'assise portent des repères d'étalonnage. Les réglages d'usine sont indiqués.

5.1 Profondeur d'assise

Réglage du dossier




1. Désserrez (A).
2. Réglez (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A) à 7 Nm.

Réglage du système d'assise

1. Retirez le siège (voir «Utilisation - diminuer la taille du système d'assise pour le transport»).
2. Retirez les vis (B).
3. Déplacez (C) et (D).
4. Serrez les vis (B).
5. Remettez le siège en place voir «Utilisation - Installation du système d'assise après le transport»)


5.2 Largeur du siège

1. Désserrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

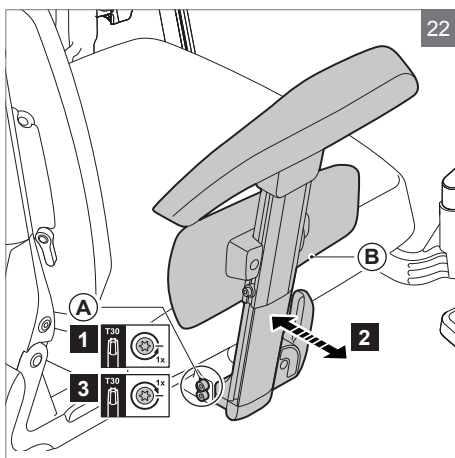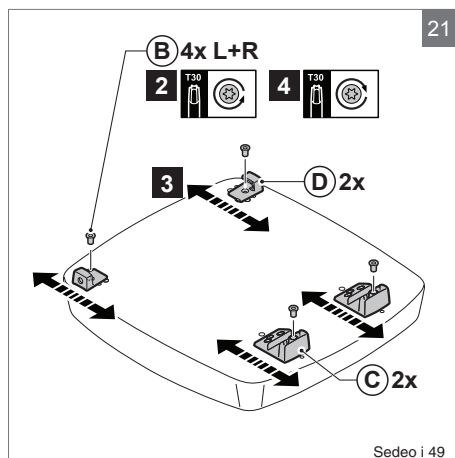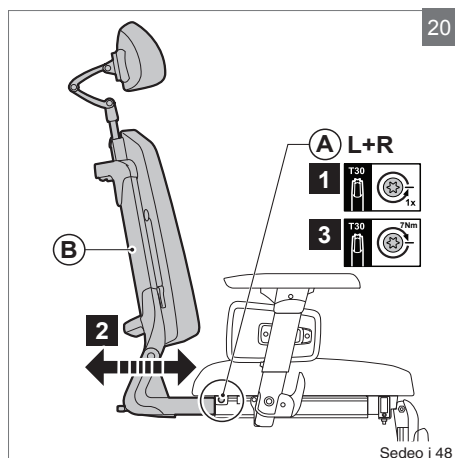


5.3 Angle du dossier

1. Tournez (A) pour régler (B).

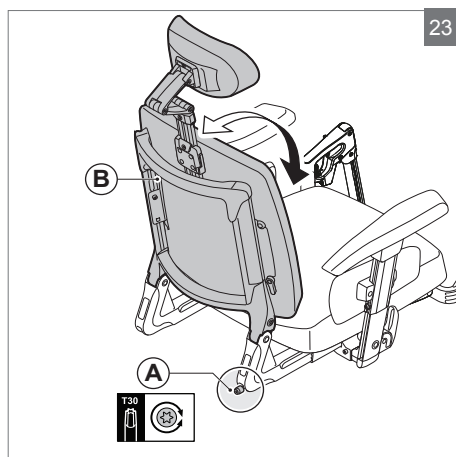

5.4 Hauteur du dossier


1. Désérrez (A) d'un tour.
2. Réglez (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

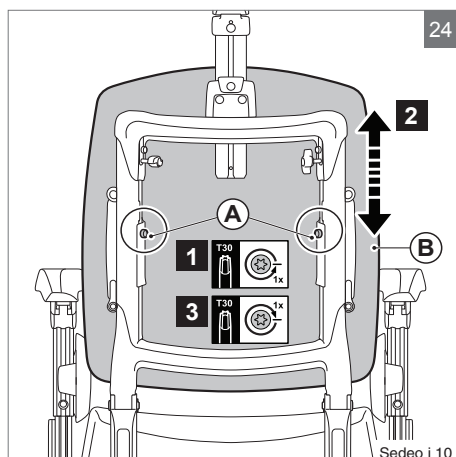

5.5 Repose-jambe standard ou à montée manuelle

Largeur du repose-jambe

1. Désérrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

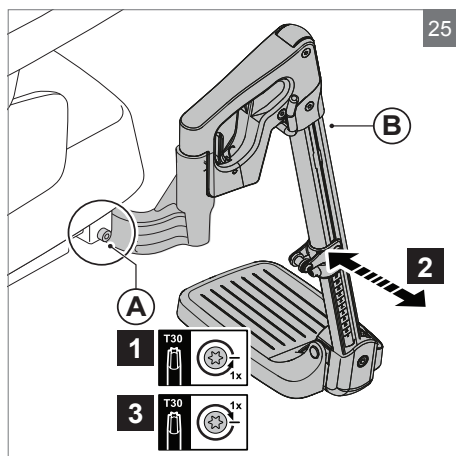


Longueur inférieure de la jambe


1. Dévissez le vis (A) avec une clé coudée male 4.
2. Glissez le repose pied (B) dans la position désirée.
3. Revissez le vis (A).

⚠ Attention !

Vérifiez que l'espace libre est suffisant sous (B) pour que le fauteuil roulant puisse franchir les obstacles.

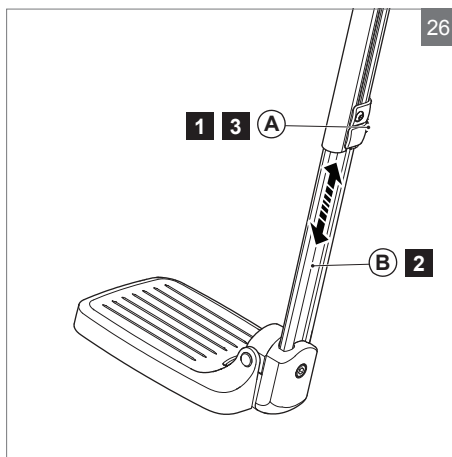**Angle de repose pieds**

1. Dévissez le boulon (A) partiellement.
2. Ajustez l'angle de la plaque repose pied dans une position confortable (B).
3. Revissez (A).

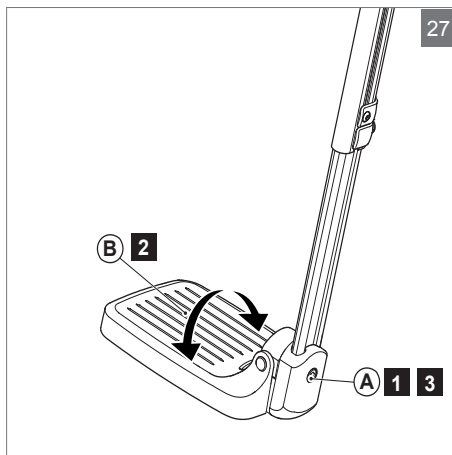
**5.6 Repose pieds (pour petites et grandes largeurs d'assise)****Profondeur de repose pieds**

Le plaques de repose pieds sont attachées asymétriquement. La gauche et la droite peuvent être changé.

1. Dévissez le boulon (A) avec une clé coudée male 4.
2. Retirez le repose pied
3. Mettez le tube du bas dans l'autre repose jambe.
4. Revissez le boulon (A).

⚠ Attention !

Contrôlez que les roues ne touchent pas les repose jambes en faisant des manœuvres. Si cela ce produit, les repose jambes doivent être placé plus en avant. Il faut au moins 1 cm d'espace entre les roues et le repose jambe.

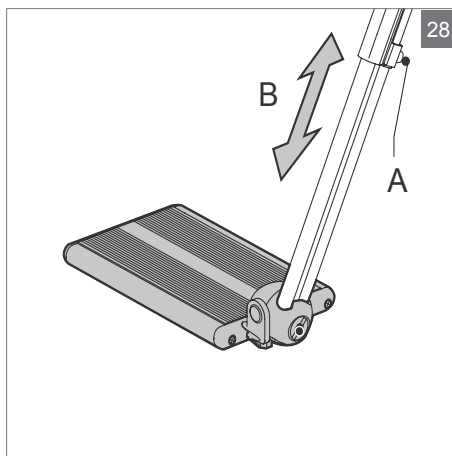

5.7 Repose jambes confort

Hauteur du repose-mollet


1. Dévissez les boulons (A) partiellement avec une clé coudée male 4.
2. Glissez le maintien mollet (D) dans la position désirée.
3. Revissez (A).

Profondeur du repose-mollet

4. Dévissez partiellement (B).
5. Glissez le maintien mollet (D) dans la position désirée.
6. Revissez (B).

Largeur du repose-mollet

7. Dévissez partiellement (C).
8. Glissez le maintien mollet (D) dans la position désirée.
9. Revissez (C).

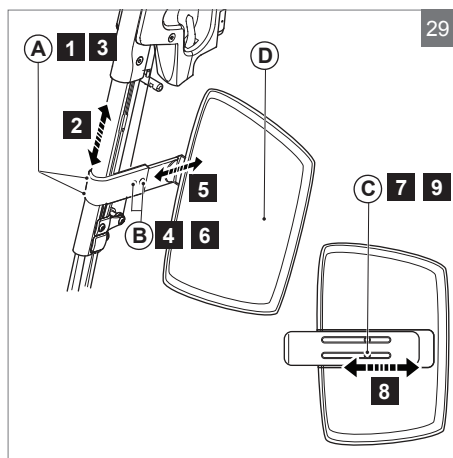


5.8 Repose-jambe central

Longueur inférieure de la jambe

1. Désserrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

⚠ Attention !

Vérifiez que l'espace libre est suffisant sous (B) pour que le fauteuil roulant puisse franchir les obstacles.

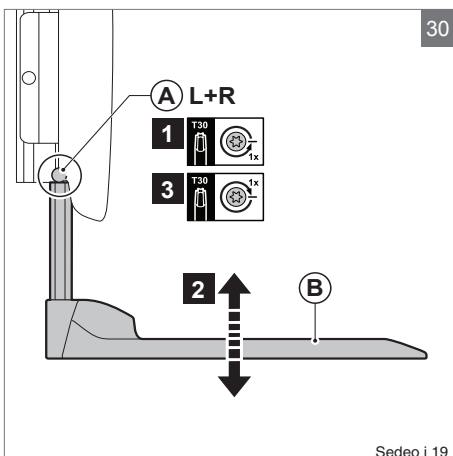


Sedeo i 19

Angle au niveau du genou

1. Désserrez (A) de deux tours.
2. Réglez (B) selon l'angle voulu.
3. Serrez (A) de deux tours.

⚠ Attention !


Changez la hauteur ou l'angle au niveau du genou si le repose-pied entre en contact avec les roulettes.

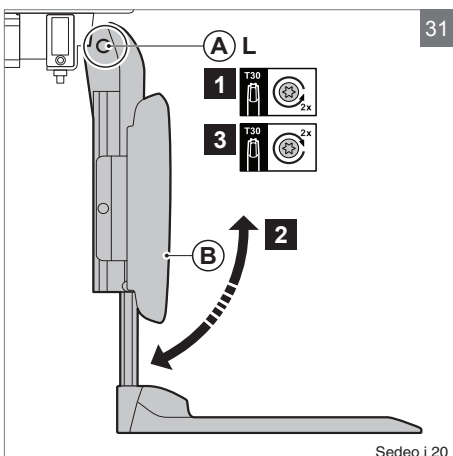


Sedeo i 20

Angle au niveau de la cheville

1. Relevez (A).
2. Tournez (B) pour régler l'angle voulu au niveau de la cheville.
3. Pliez (A) vers le bas.

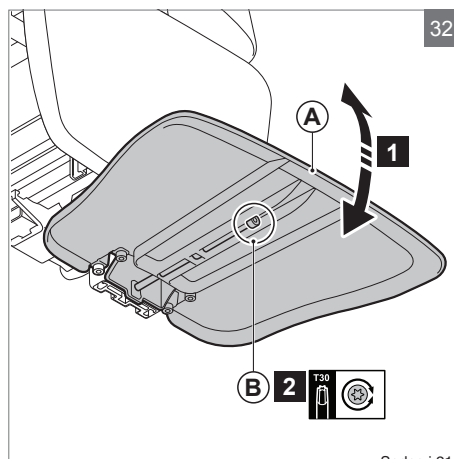**Hauteur du repose-mollets**


1. Désserrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

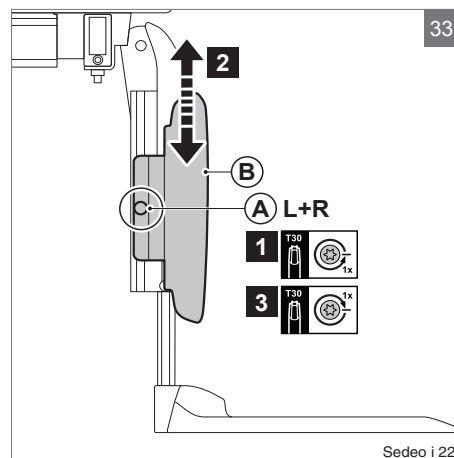**5.9 Repose-jambe central****Longueur inférieure de la jambe**

1. Désserrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).


⚠ Attention !

Vérifiez que l'espace libre est suffisant sous (B) pour que le fauteuil roulant puisse franchir les obstacles.

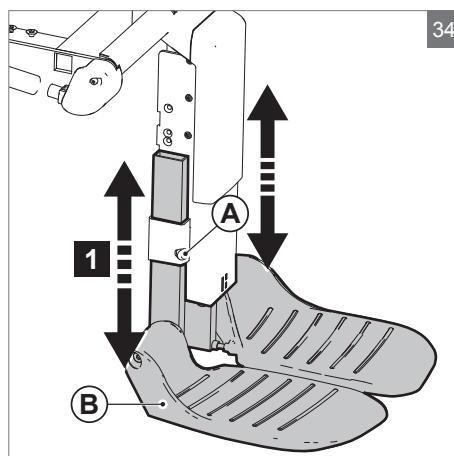


Angle au niveau de la cheville


1. Relevez (A).
2. Tournez (B) pour régler l'angle voulu au niveau de la cheville.
3. Pliez (A) vers le bas.

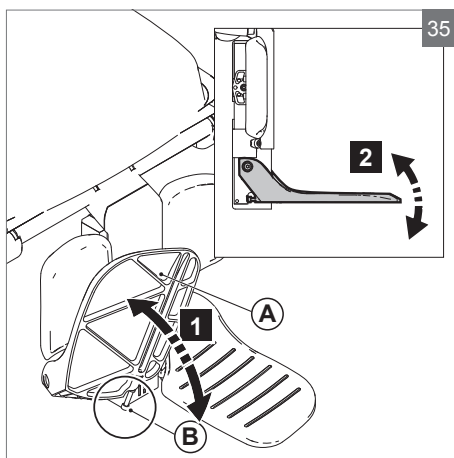**Hauteur des repose-mollets (1)**

1. Étendez la longueur inférieure du repose-jambes
2. Désserrez (A) (2x).
3. Faites glisser (B) à la hauteur voulue et déplacez (A) vers des trous supérieurs / inférieurs (C)
4. Serrer (A) (2x).

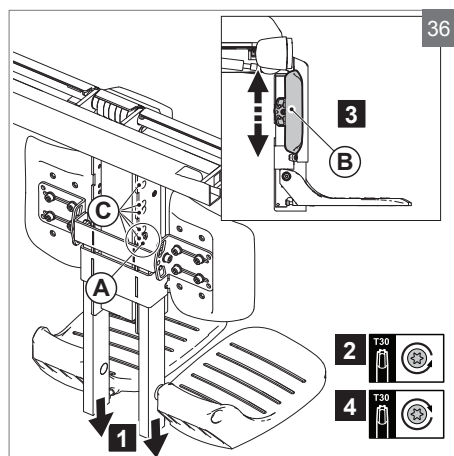
**Hauteur des repose-mollets (2)**

1. Désserrez (A).
2. Faites glisser (B) à la hauteur voulue et déplacez (A) vers des trous supérieurs / inférieurs
3. Serrez (A).

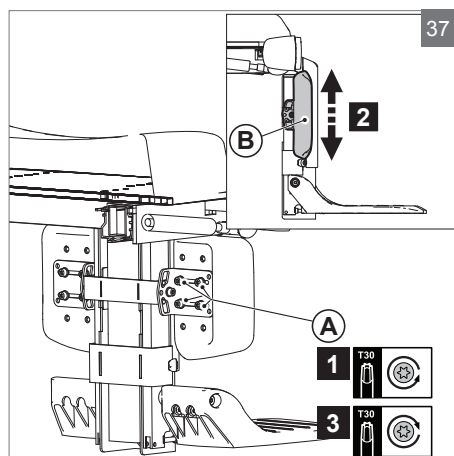


Largeur du repose-mollet

1. Dévissez (A) d'un tour.
2. Glissez le repose-mollet (D) dans la position désirée.
3. Revissez (A).

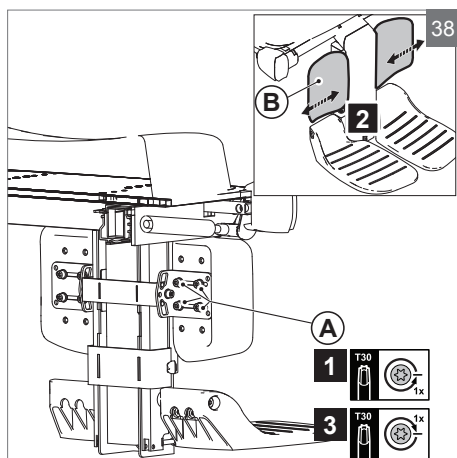**Profondeur du repose-mollet**


1. Dévissez (A) .
2. Glissez le repose-mollet (B) dans la position désirée et déplacez (A) vers le trou correspondant.
1. Revissez (A).

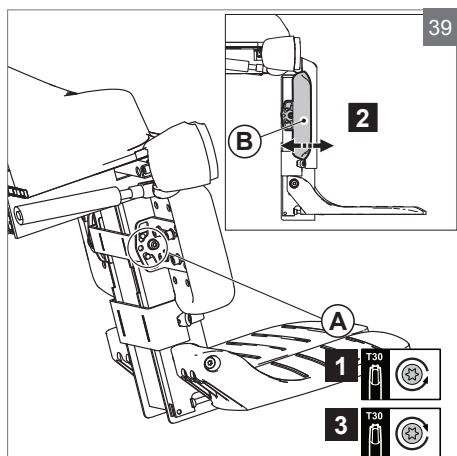**5.10 Accoudoir****Hauteur de l'accoudoir**

1. Déserez (A) d'un tour.
2. Réglez (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

Remarque !

Vérifiez que les bras sont bien soutenus, sans que les épaules soient poussées vers le haut.

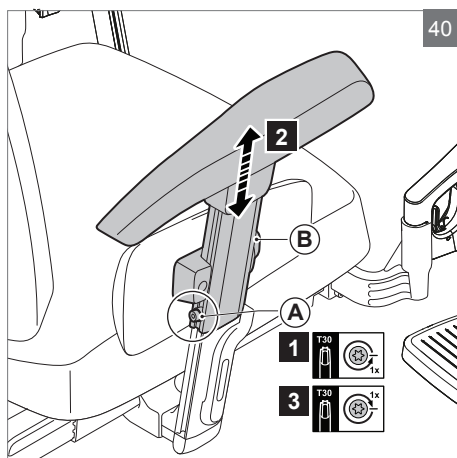


Profondeur de l'accoudoir


1. Déserez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

Remarque !

Positionnez l'accoudoir plus en arrière pour disposer de plus d'espace pour les transferts.

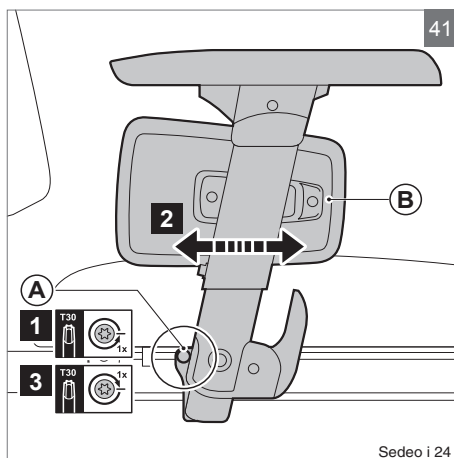
**Profondeur du coussinet de l'accoudoir**

1. Déserez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

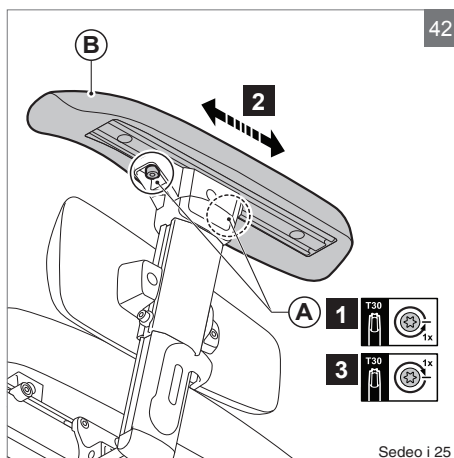
**Largeur de l'accoudoir, avec ou sans support de contrôle**

Pour le retirer :


1. Déserez (A).
2. Enlevez (B).

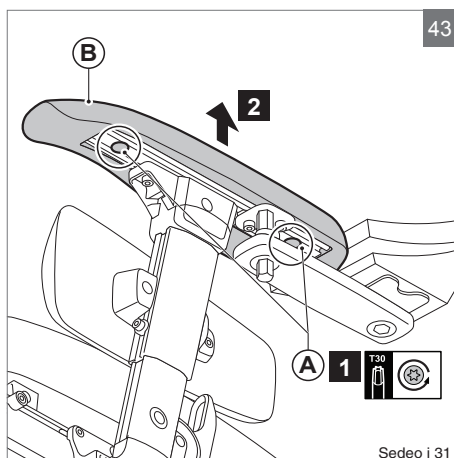

3. Au besoin, déserrez (C) d'un tour.
4. Retirez (D) s'il y a lieu.

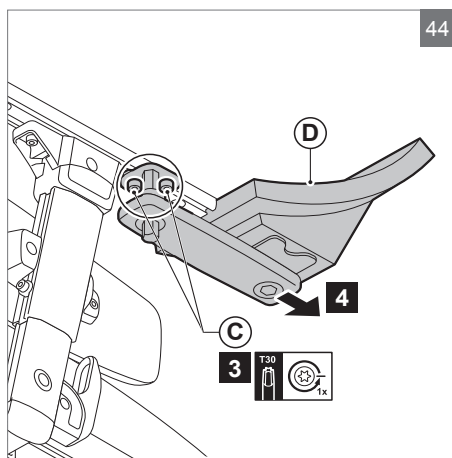

5. Déserrez (E) d'un tour.
6. Retirez (F).

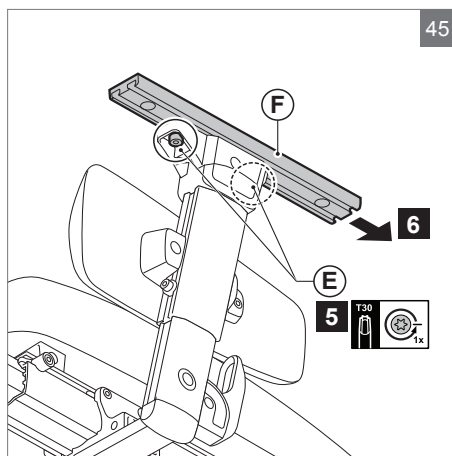


Pour positionner :

1. Faites glisser simultanément (A) et (B) ou (C) sur (D).


Remarque !

Vérifiez que le cerclage du bloc terminal tombe dans l'ouverture.

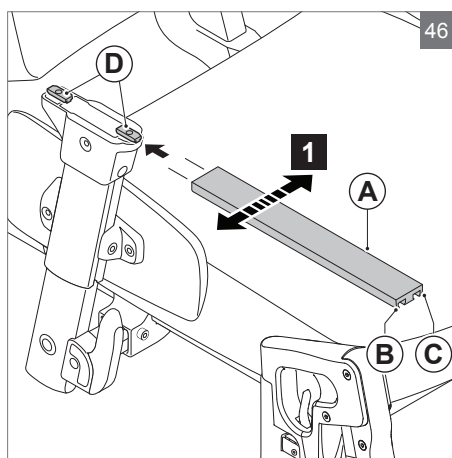


2. Ajustez la profondeur de (A) et serrez (E).

3. Positionnez le support de contrôle.
4. Positionnez l'accoudoir.

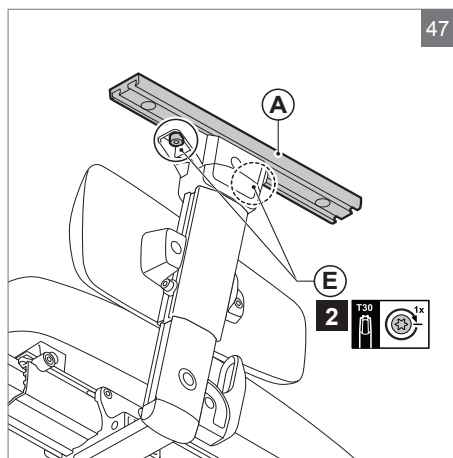


Changer l'angle de l'accoudoir

1. Déserrez (A) d'un tour.
2. Inclinez (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

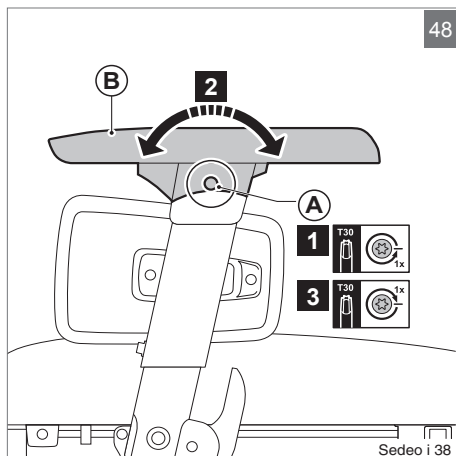

Hauteur du panneau latéral

1. Déserrez (A) d'un tour.
2. Réglez (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

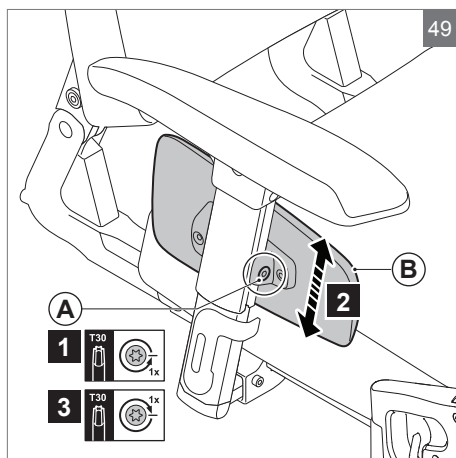

5.11 Réglage du centre de gravité

⚠ Avertissement !


Une modification du centre de gravité du fauteuil roulant peut influencer négativement les caractéristiques de conduite du fauteuil roulant et/ou sa stabilité dynamique. Ces réglages ne doivent être effectués que par des professionnels.

1. Désérrez (A) d'un tour.
2. Faites coulisser (B) vers l'avant ou l'arrière.
3. Serrez (A).


Remarque !

Si la répartition du poids de l'utilisateur est moyenne, le centre de gravité doit être ajusté sur le même réglage que la profondeur du siège.

Pour un meilleur coulisement, désérrez le réglage de la profondeur d'assise.

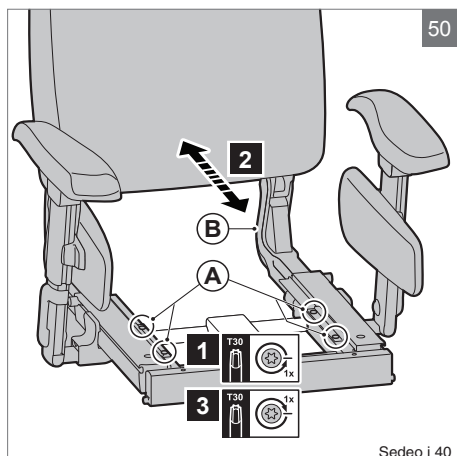

Sedeo i 40

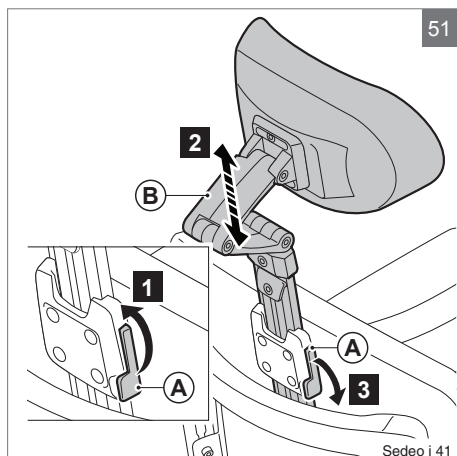

Sedeo i 41


5.12 Appui-tête

Hauteur de l'appui-tête

1. Soulevez (A).
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Poussez (A) vers le bas.

Ajustement du réglage mémorisé

1. Désérrez (C) d'un tour.
2. Faites glisser (D) aussi bas que possible.
3. Serrez (C).

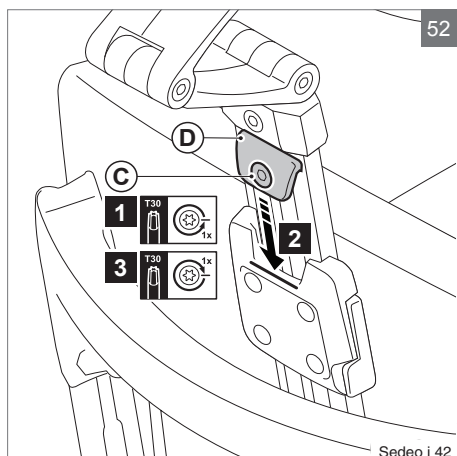


Sedeo i 42

Position de l'appui-tête


1. Désérrez (A) d'un tour.
2. Réglez (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

Remarque !


Corrigez la hauteur de l'appui-tête et inclinez le coussin d'appui-tête selon les besoins.

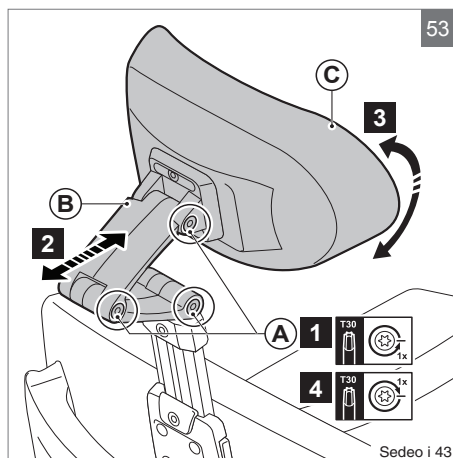**Largeur du coussin d'appui-tête**

1. Désérrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

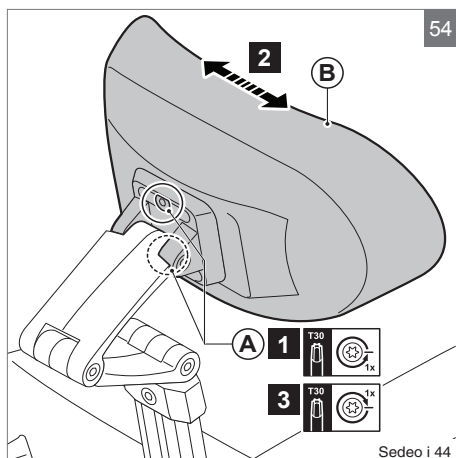
**5.13 Support de contrôle fixe/ pivotant****Profondeur**

1. Désérrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

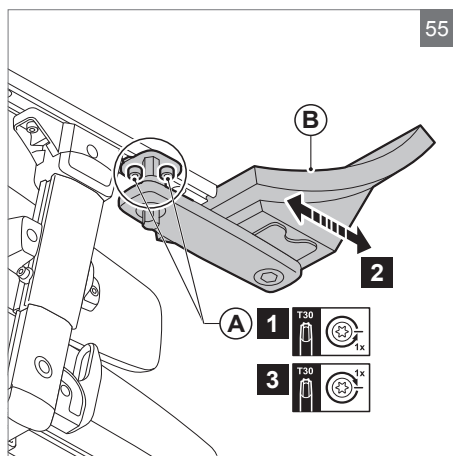


Hauteur (1)

1. Déserez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

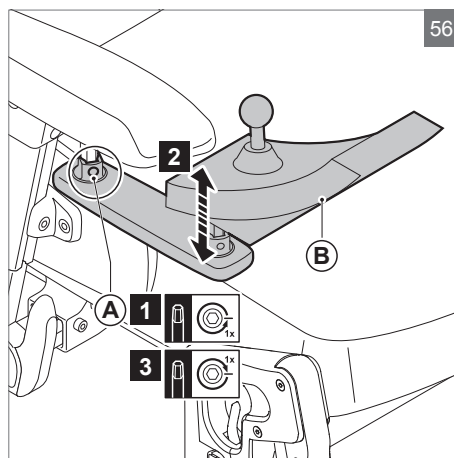**Hauteur (2)**


1. Déserez (C) d'un tour.
2. Faites glisser (D) dans la position voulue.
3. Serrez (C).

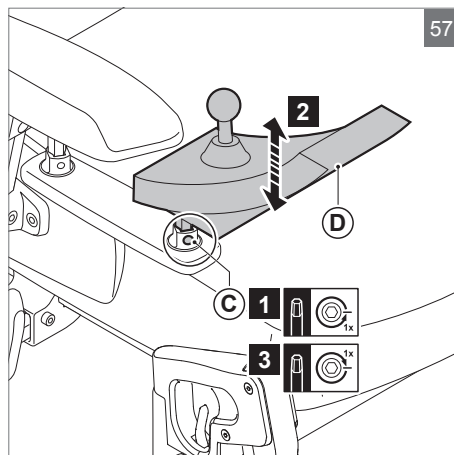**5.14 Support d'abduction****Réglez le support d'abduction comme suit :**

1. Déserez la vis Torx.
2. Réglez la pièce dans la position voulue.
3. Serrez la vis Torx.

A/a. Réglage de la hauteur.

B/b. Réglage de la profondeur.

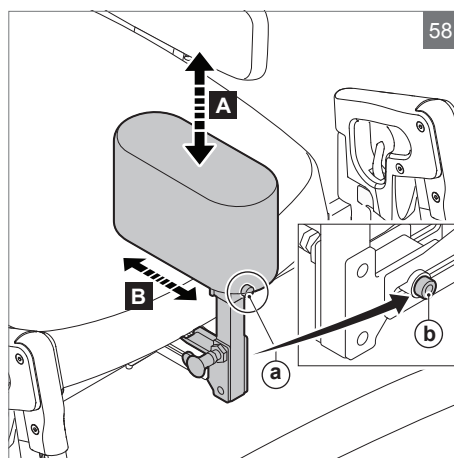


5.15 Dossier avec sangles réglables - souple

Les côtés du dossier avec sangles réglables peuvent être ajustés comme suit :

1. Désserrez les quatre vis Torx.
2. Réglez les côtés dans la position voulue.
3. Serrez les quatre vis Torx.

A/a. Réglage de l'angle.

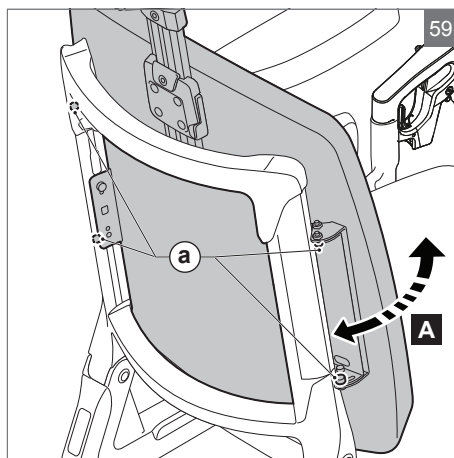


5.16 Support thoracique

Réglez le support thoracique comme suit :

1. Désserrez la vis Torx.
2. Réglez la pièce dans la position voulue.
3. Serrez la vis Torx.


A/a. Réglage approximatif de la largeur

B/b. Réglage de la hauteur.

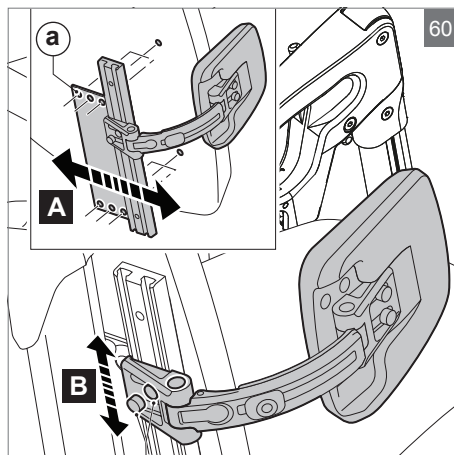


A/a. Réglage de la profondeur du support

B/b. Réglage de la profondeur du coussin

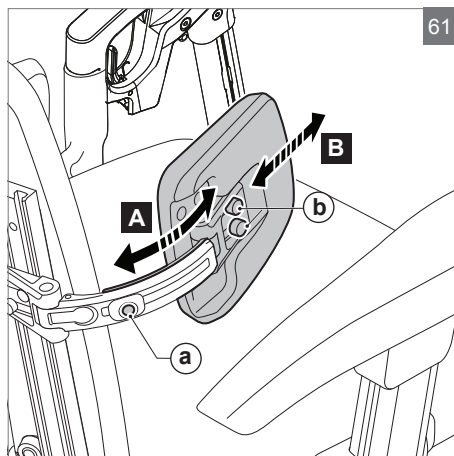

- A/a. Réglage de l'angle du coussin
B/b. Réglage fin de la largeur

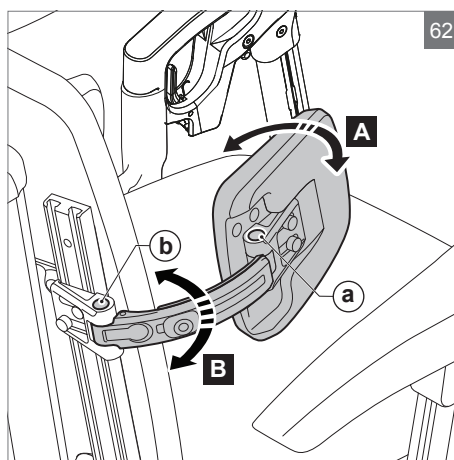


5.17 Support de cuisse

Réglez le support de cuisse comme suit :

1. Désérrez la vis Torx.
2. Réglez la pièce dans la position voulue.
3. Serrez la vis Torx.


- A/a. Réglage de la profondeur
B/b. Réglage de la largeur

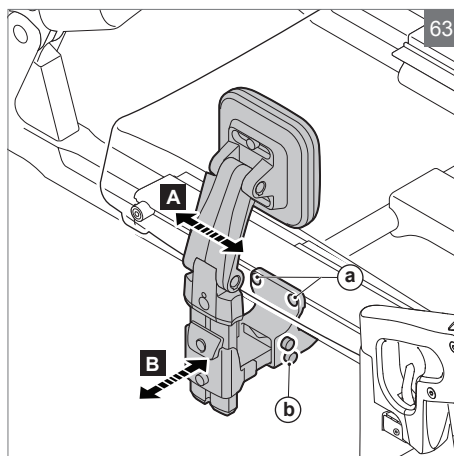

- A/a. Réglage de la hauteur.
B/b. Ajustement du réglage mémorisé
C/c. Réglage de la position du support
D/d. Réglage de la position du coussin

Conseil!


Le réglage en hauteur peut être fixé à l'aide du réglage mémorisé.

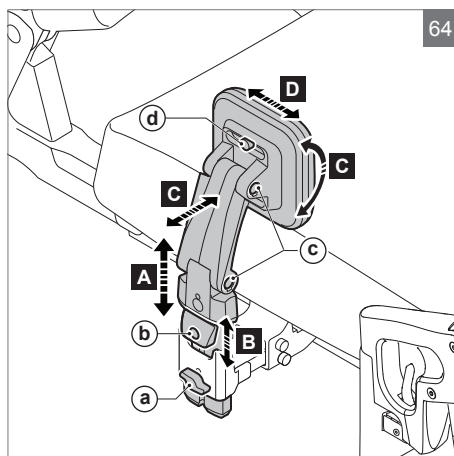

5.18 Fixation de la sangle ventrale

Fixation sur la coulisse


1. Désérrez les 2 (A) et retirez (A) des coulisses gauche et droite.
2. Placez (B) dans les coulisses et serrez dans la position voulue.
3. Repositionnez les 2 (A) dans les coulisses et serrez (A).

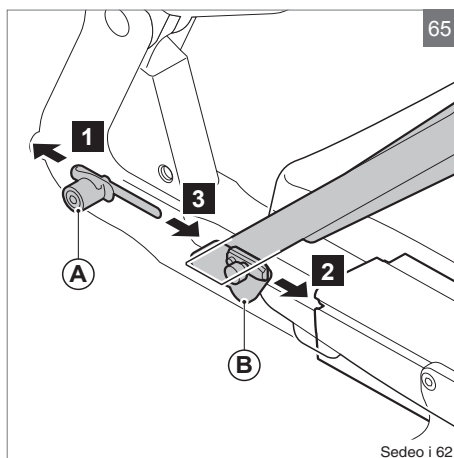

Sedeo i 62

Fixation au châssis d'assise

1. Fixez (A) au châssis d'assise à l'aide d'une vis à droite et à gauche.

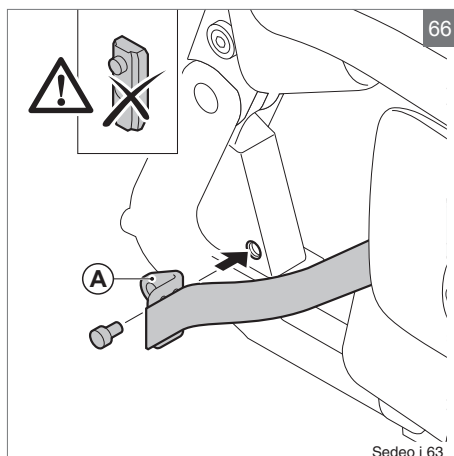

Sedeo i 63


⚠ Avertissement !

Vérifiez que la sangle ventrale est ajustée pour l'utilisateur du fauteuil roulant. La sangle doit être ajustée au niveau des hanches, selon un angle de 45° environ.


Vérifiez que la sangle est toujours propre et que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement. La sangle et le mécanisme de verrouillage peuvent être nettoyés avec un chiffon humide.

Si la sangle est positionnée au-dessus des hanches et en travers du ventre de l'utilisateur, une posture d'assise incorrecte peut en résulter et l'utilisateur peut s'affaïsser dans le siège.

N'utilisez jamais la sangle ventrale comme ceinture de sécurité lors du transport.

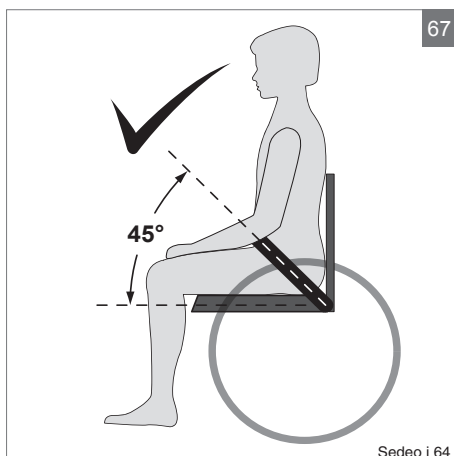

Sedeo i 64

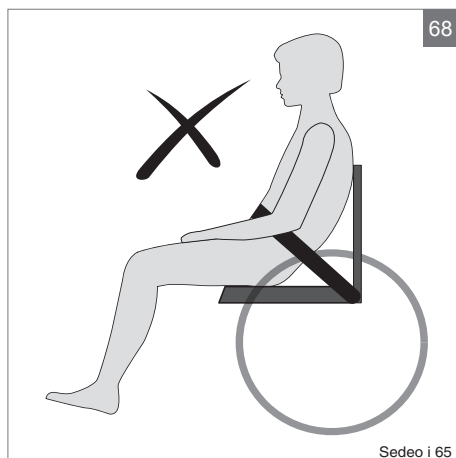

5.19 Dossier passager

Largeur du siège

1. Desserrez (A) d'un tour.
2. Faites glisser (B) dans la position voulue.
3. Serrez (A).

Profondeur d'assise


Voir 5.1 « Profondeur d'assise ».

Réglage du centre de gravité

Voir 5.9 « Réglage du centre de gravité ».

⚠ Avertissement !

La stabilité du fauteuil roulant dépend du réglage du centre de gravité du système d'assise. Ces réglages ne doivent être effectués que par des professionnels.

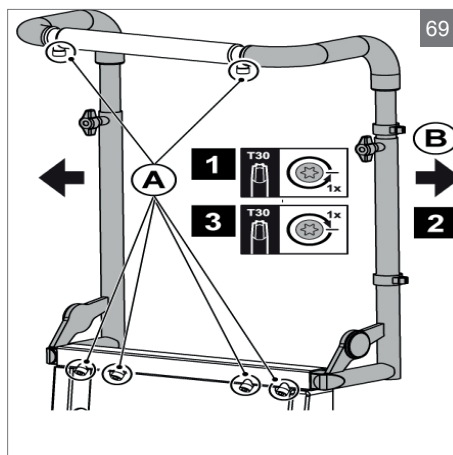

6 Transport

6.1 Diminuer la taille du système d'assise pour le transport


- B. Assise (2,5 kg)
- C. Dossier (2,5 kg)
- D. Accoudoir (2 kg)
- E. Repose-jambe (1,7 kg)
- F. Appui-tête (1,3 kg)

⚠ Avertissement !

La taille du fauteuil roulant peut être diminuée pour le transport lorsqu'il est inoccupé. Tous les composants du système d'assise qui sont facilement détachables doivent être retirés. Rangez ces composants en lieu sûr afin qu'ils ne provoquent ni blessure ni dégâts et qu'ils ne soient pas endommagés.


Retirer le coussin d'assise

1. Tirez (B) vers le haut et vers l'avant.

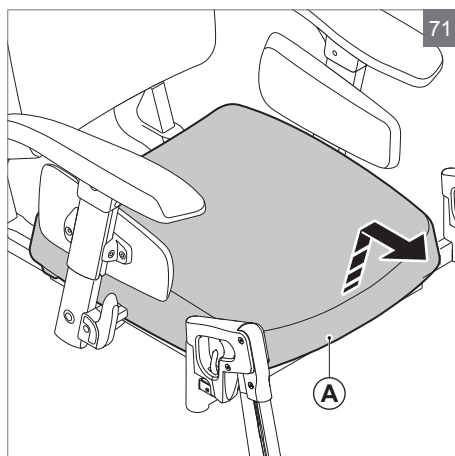

Retirer le coussin du dossier

1. Tournez (A) et (B).
2. Depuis le bas, tirez (C) en avant et vers le haut et retirez-le.

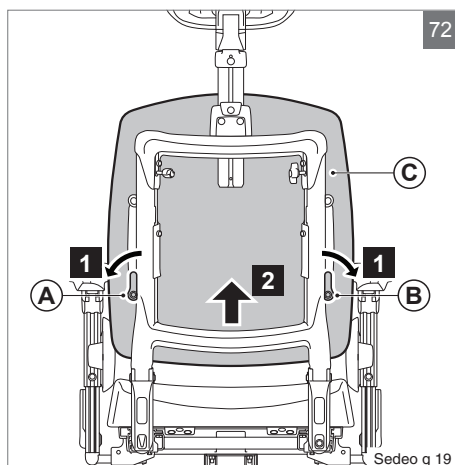

Repli complet du dossier vers l'avant

1. Déserez (A).


Remarque !

Ne retirez pas (A).

2. Pliez (B) complètement en avant.


Remarque !

Au besoin, retirez préalablement le coussin du dossier et/ou les accoudoirs.

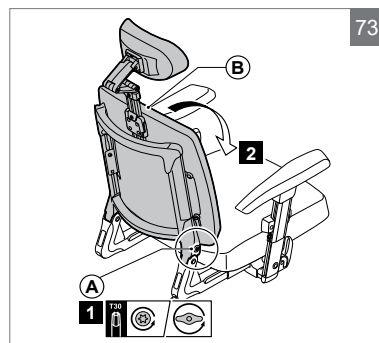**Enlever les repose-jambes**

1. Détachez la bande du mollet.
2. Poussez la gâchette(A) vers l'arrière pour déverrouiller le repose-jambes (fig 35)
3. Faites pivoter le repose-jambes vers l'extérieur.
4. Sortez le repose-jambes (B) du support par le haut.

En remplaçant le repose-jambes, vous devez entendre un déclic. C'est à ce moment que le repose-jambes est à nouveau verrouillé

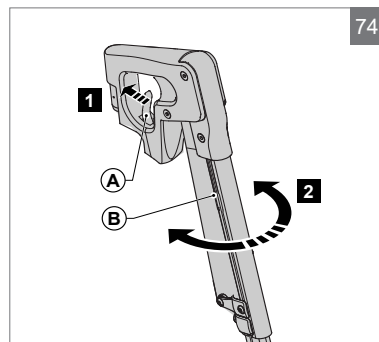


Avertissement! Risque de pincement des doigts


**⚠ Avertissement!**

Lors du retrait du repose-jambe escamotable à élévation manuelle, tenez le repose-jambe au niveau de la poignée (A).

Si votre doigt se trouve à l'emplacement B lorsque vous actionnez le levier de libération C, vous risquez de vous faire pincer le doigt.

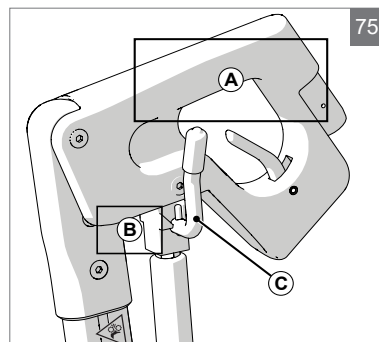**Enlevez l'accoudoir**


1. Basculez (A) vers le bas.
2. Enlevez (B).

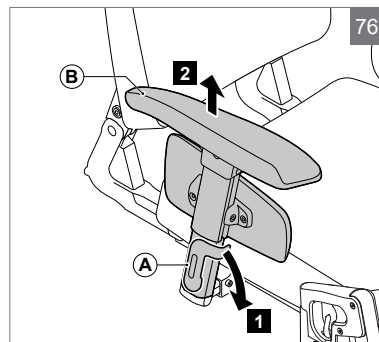

6.2 Installation du système d'assise après le transport


Positionnement de l'accoudoir

1. Faites coulisser (A) sur (B).
2. Poussez (C) vers le haut.

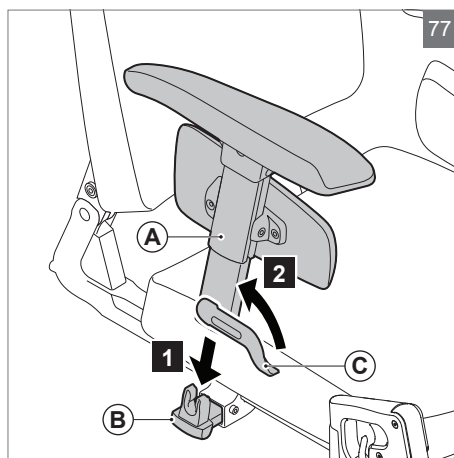

Positionnement du dossier pour utilisation

1. Pliez (A) vers le haut et vers l'arrière.
2. Serrez (B).

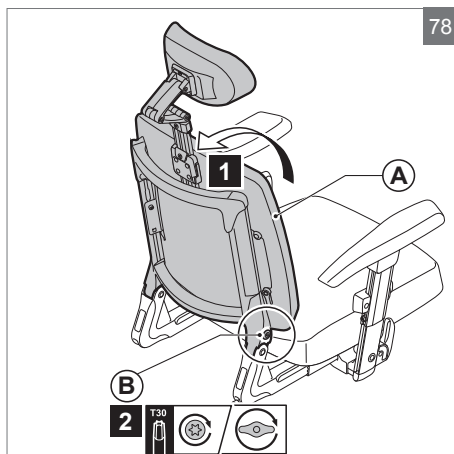


Positionner le coussin du dossier

1. Accrochez (A) derrière (B).
2. Tournez (C).

⚠ Attention !

Vérifiez que le coussin du dossier est fermement positionné (poignées vers le haut).

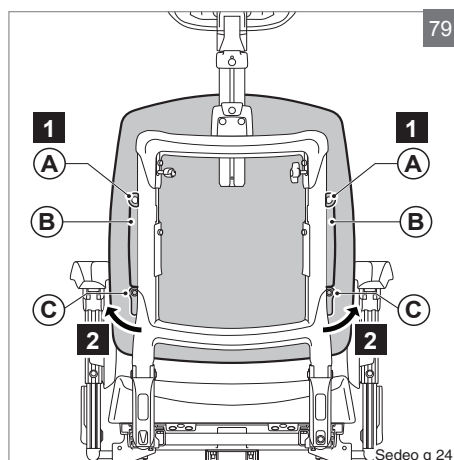


Positionnement du siège

1. Faites glisser (A) et (B) sur (C) et (D).
2. Poussez (E) vers le bas.

⚠ Attention !

Veillez à ce que (A) et (B) au dos du siège s'accrochent sous les têtes de boulon.

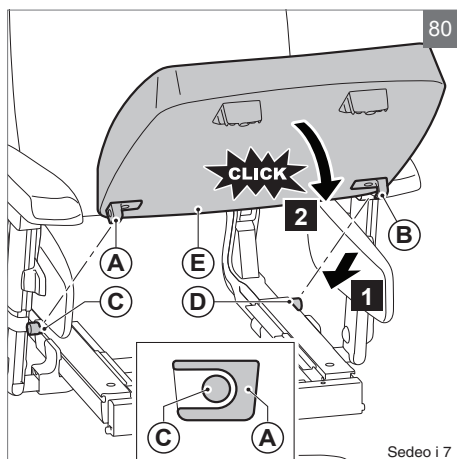

7 Entretien

Il est conseillé de faire entretenir votre fauteuil roulant au moins une fois par an, ou en cas d'utilisation intensive, une fois tous les six mois par votre revendeur.

7.1 Nettoyage de l'habillage

Nettoyez l'habillage du fauteuil avec un chiffon humide et du savon ménager. Séchez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Pièces en PU

Nettoyez les accoudoirs, les coussins latéraux etc. avec un chiffon humide et du savon ménager. Séchez ensuite les pièces avec un chiffon doux.



Habillage du siège et du dossier

Suivez les instructions de lavage des housses: Pour la housse d'incontinence voir la figure 80. Pour la housse de confort voir la figure 81.

Avertissement!

N'utilisez pas de solvants organiques tels que diluants, benzène ou white spirit.

Ne nettoyez pas l'habillage par une méthode chimique. Ne repassez pas l'habillage et ne le faites pas sécher en machine.

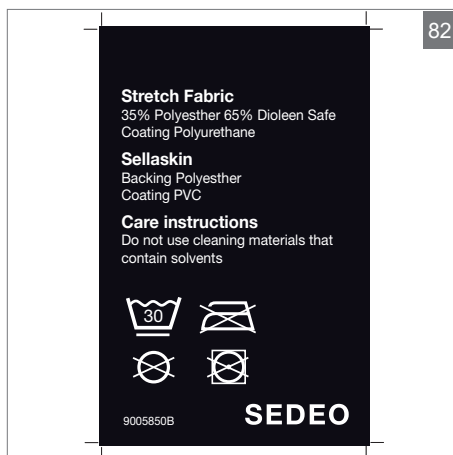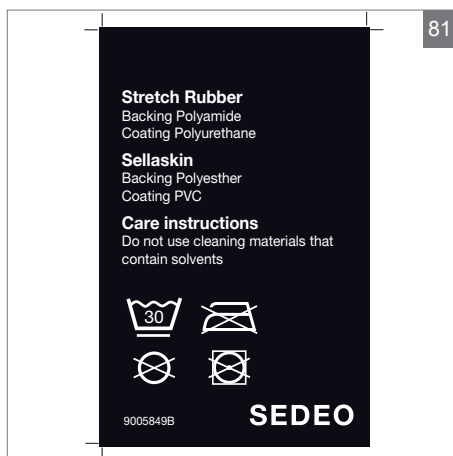

8 Dépannage

En cas de problème avec le système d'assise, contactez votre revendeur.

9 Caractéristiques techniques

9.1 Déclaration de conformité et exigences

1. EN-ISO 10993-5 (1999-11) Évaluation biologique des appareils médicaux.
2. EN 1021 1,2 Évaluation de l'inflammabilité du mobilier revêtu. Source d'inflammation : équivalent d'une cigarette/flamme d'allumette.

9.2 Informations techniques

Description	Unité	Valeurs
Système d'assise		
Poids de l'utilisateur	kg	160
Largeur d'assise	mm	400 - 540
Largeur d'assise (option)	mm	520 - 680
Profondeur d'assise	mm	440 - 600
Centre de gravité	mm	95
Assise		
Position du coussin d'assise en profondeur	mm	-20 / 0 / +20
Dossier		
Hauteur du dossier	mm	500 - 640
Angle du dossier	°	89 - 128
Inclinaison du dossier (option)	°	89 - 128
Accoudoir		
Largeur du coussin d'accoudoir	mm	-20 / 0 par côté
Hauteur du coussin d'accoudoir	mm	170 - 290
Hauteur du coussin d'accoudoir (option)	mm	270 - 390
Profondeur de l'accoudoir	mm	80
Angle du coussin d'accoudoir	°	0 - 15
Profondeur du coussin d'accoudoir, côté support de contrôle	mm	50
Profondeur du coussin d'accoudoir, côté opposé au support de contrôle	mm	160
Support latéral		
Hauteur du coussin latéral	mm	65

Description	Unité	Valeurs
Repose-jambe central		
Longueur inférieure de la jambe (avec siège comprimé)	mm	350 - 515
Angle au niveau du genou*	°	30 - 110
Angle au niveau de la cheville	°	+20 à -40
Hauteur du support de mollet central (option)	mm	120
Repose-jambes central à élévation manuelle		
Longueur inférieure de la jambe (avec siège comprimé)	mm	385 - 550
Angle au niveau du genou*	°	30 - 110
Angle au niveau de la cheville	°	+20 à -40
Hauteur du support de mollet central	mm	120
Largeur du support latéral sur le support de mollet central	mm	0 - 100
Repose-jambes central à élévation électrique		
Longueur inférieure de la jambe (avec siège comprimé)	mm	365 - 530
Angle au niveau du genou*	°	10 - 86
Compensation de longueur maximale	mm	180
Angle au niveau de la cheville	°	+20 till -20
Hauteur du support de mollet	mm	90
Largeur du support de mollet	mm	350 - 430
Repose-jambe standard (ensemble)		
Longueur inférieure de la jambe (avec siège comprimé)	mm	360 - 530
Angle au niveau du genou*	°	70
Angle au niveau de la cheville	°	0 - 180
Repose-jambe à élévation et élévation électrique (ensemble)		
Longueur inférieure de la jambe (avec siège comprimé)	mm	360 - 540
Angle au niveau du genou*	°	10 - 80
Angle au niveau de la cheville	°	0 - 180
Hauteur du coussin de mollet	mm	120
Appui-tête		
Hauteur de l'appui-tête (mémorisée)	mm	170
Profondeur de l'appui-tête	mm	180
Angle vertical de l'appui-tête	°	-45 - 45
Largeur de l'appui-tête standard (option)	mm	-20 - 20
Largeur de l'appui-tête réglable (option)	mm	-110 - 110
Support de contrôle		
Hauteur du support de contrôle	mm	60
Profondeur du support de contrôle	mm	35
Pivotement du support de contrôle		
Hauteur du support de contrôle	mm	50
Profondeur du support de contrôle	mm	35
Angle de positionnement du contrôle	°	0 - 45

Description	Unité	Valeurs
Barre poussoir		
Hauteur de la barre poussoir	mm	185
Hémiplégie		
Angle de l'accoudoir pour hémiplégique (option)	°	0 - 45
Support d'abduction		
Hauteur du support d'abduction	mm	60 - 120
Profondeur du support d'abduction	mm	60 - 110
Support thoracique		
Largeur du support thoracique	mm	60 - 0
Hauteur du support thoracique	mm	200 - 400
Profondeur du support thoracique	mm	20 - 70

* = 0 ° jambes droit devant et 90 ° = jambes dans un angle droit vers le bas

10 Marquage

10.1 Indications relatives au système d'assise

Marques utilisées sur le système d'assise (figure 82) :

1. Le fauteuil roulant ne doit pas être soulevé par les accoudoirs, en entier et/ou par les repose-jambes.
2. La stabilité du fauteuil roulant dépend du réglage du centre de gravité du système d'assise. Ces réglages ne doivent être effectués que par des professionnels.

1



83

2



11 Dispositions relatives à la garantie

Les dispositions et les responsabilités relatives à la garantie applicable au système d'assise sont identiques à celles intégrées dans le manuel du fauteuil roulant.

( Fauteuil roulant)

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel. +41 (0)31 958 38 38
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Concessionnaire/distributeur :

Numéro de série:

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektonowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr



1011652_OM_Sedeo_Lite_Pro_HiRes_
EU_FR_Rev.I_2023-11-13