


Setesystem

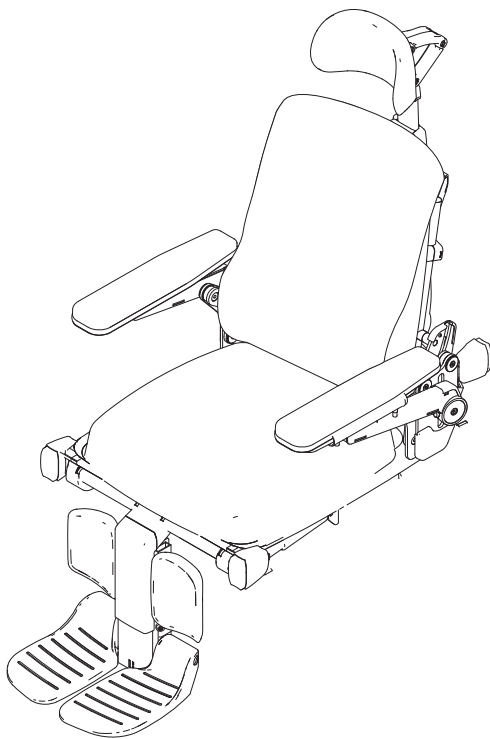

Sedeo Pro+

BRUKERMANUAL

NO

SEDEO

9010303B

© 2016 Sunrise Medical

Alle rettigheter forbeholdt.

Informasjonen i denne manualen kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofilm eller i noen som helst annen form, det være seg elektronisk eller mekanisk, uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Sunrise Medical.

Informasjonen som er gitt her er basert på generelle data vedrørende konstruksjonen kjent på tidspunktet for publisering av denne manualen. Sunrise Medical har en policy om kontinuerlig forbedring og forbeholder seg retten til å utføre endringer og modifikasjoner.

Den gitte informasjonen gjelder for produktet i sin standardversjon. Sunrise Medical kan ikke holdes ansvarlig for mulige skader som skyldes spesifikasjoner til produktet, avvikende fra standardkonfigurasjonen. Det kan være visse avvik i illustrasjonene i denne brukermanualen og konfigurasjonen til ditt sittesystem.

Den tilgjengelige informasjonen er blitt preparert med all mulig grundighet, men Sunrise Medical kan ikke holdes ansvarlig for mulige feil i informasjonen, og konsekvenser av slike feil. Sunrise Medical påtar seg ikke noe ansvar for tap som skyldes arbeid utført av tredjepart.

Navn, salgsnavn osv. som brukes av Sunrise Medical skal ikke, i henhold til lovgiving vedrørende beskyttelse av salgsnavn, anses å være tilgjengelige.

Innholdsfortegnelse

1	Forord.....	4
1.1	Denne brukermanualen	4
1.2	For mer informasjon	4
1.3	Symboler som brukes i denne manualen	4
2	Sikkerhet	5
2.1	Temperatur	5
2.2	Indikasjoner på setesystemet	5
2.3	Bevegelige deler	5
3	Generell beskrivelse.....	6
3.1	Produktbeskrivelse av Sedeo Pro+	6
4	Bruk	7
4.1	Justering av setesystemet (av brukeren/ledsageren)	7
4.2	Komme seg inn og ut av rullestolen (overføring)	8
4.3	Alternativer / ekstrautstyr	9
5	Justering av setesystemet (må utføres av fagfolk).....	11
5.1	Setebredde	11
5.2	Setedybde	11
5.3	Rygghøyde	12
5.4	Standardbeinstøtte og manuelt heisbar beinstøtte	12
5.5	Midtre beinstøtte	14
5.6	Elektrisk midtre beinstøtte	15
5.7	Armleneenhet	17
5.8	Justere tyngdepunktet	20
5.9	Hodestøtte	21
5.10	Fast/svingbar styreboksbrakett	22
5.11	Ryggstøtte med justerbare stropper – fleksible	23
5.12	Justering av kurvatur på velcroygg	23
5.13	Lårstøtte	24
5.14	Sidestøtte	24
5.15	Feste hoftebeltet	25
6	Transport	27
6.4	Redusere størrelsen til setesystemet ved transport	27
6.5	Sette opp setesystemet etter transport	28
7	Vedlikehold	30
7.1	Rengjøring av polstringen	30
8	Feilsøking	31
9	Tekniske spesifikasjoner.....	32
9.1	CE-erklæring og -krav	32
9.2	Teknisk informasjon	32
10	Garanti.....	34

1 Forord

1.1 Denne brukermanualen

Denne brukermanualen vil hjelpe deg med å vedlikeholde og bruke setesystemet ditt på en sikker måte. Denne brukermanualen er et supplement til Handicares generelle brukermanual for rullestolen. Der det er aktuelt, henviser denne brukermanualen til de andre brukermanualene som vist under:

-  Generelt: Henviser til den generelle brukermanualen for rullestolen.
-  Styreenhet: Henviser til brukermanualen for styreenheten (gjelder kun for elektriske rullestoler).

Les denne brukermanualen og alle brukermanualene den henviser til nøye før du bruker produktet. Hvis en av brukermanualene ikke fulgte med rullestolen, vær vennlig å kontakte forhandleren din umiddelbart.

I tillegg til denne brukermanualen, finnes det også en servicemanual for kvalifiserte teknikere.

Hvis du er svaksynt, kan dette dokumentet ses i PDF-format på www.SunriseMedical.eu, eller du kan bestille det med større tekst.

1.2 For mer informasjon

Kontakt din kommune eller hjelpemiddelsentral hvis du har spørsmål om rullestolen i forhold til bruk, vedlikehold eller sikkerhet.

Se www.SunriseMedical.eu for informasjon om sikkerhetsvarsler og tilbakekallelser av produkter.

1.3 Symboler som brukes i denne manualen

Merk!

Gjør brukeren oppmerksom på mulige problemer.

⚠ Forsiktig!

Råd til brukeren for å unngå skade på produktet.

⚠ Advarsel!

Advarer til brukeren for å unngå personskade.

Hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt, kan det føre til personskade, skade på produkt eller på miljøet!

Symboler i illustrasjonene

Hver illustrasjon har ikoner og nummerering for å indikere hva som må gjøres og i hvilken rekkefølge.



Løsne ved å dreie vingemutteren én runde



Stram ved å dreie vingemutteren én runde



Løsne ved å dreie én runde med torx skrutrekker



Feste ved å dreie én runde med torx skrutrekker



Trinn 1, 2 osv.

En pil, som del av en illustrasjon, indikerer at den komponenten det gjelder flyttes eller må flyttes i pilens retning.

2 Sikkerhet

⚠ Advarsel!

Følg alltid instruksjonene som er gitt ved varselsymbolene! Hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt, kan det føre til personskade, skade på rullestolen eller på miljøet! Der det er mulig, har advarselsymbolene blitt plassert i gjeldende avsnitt.

Vær forsiktig når du svinger til siden/slår opp deler. Unngå kontakt med deler i bevegelse.

Vis varsomhet ved røyking.

Ikke bruk rullestolen i nærheten av åpen flamme.

⚠ Forsiktig!

Rullestolens deler som ved service eller reparasjon skal fjernes uten verktøy (f.eks. armlener, beinstøtter) kan ha en negativ effekt på støtten av brukeren hvis de mangler eller ikke settes på plass på riktig sted etter å ha blitt fjernet.

2.1 Temperatur

⚠ Advarsel!

Unngå at rullestolen blir utsatt for direkte sollys over lange perioder. Visse deler av rullestolen, som setet, ryggstøttet og armleneenheten kan bli varme hvis de blir utsatt for sollys over lengre tid. Dette kan føre til brannskader eller hudirritasjoner.


2.2 Indikasjoner på setesystemet



Rullestolen må ikke løftes i armleneenheten, og/eller i beinstøttene.



Stabiliteten til rullestolen påvirkes av justeringen av setesystemets tyngdepunkt. Slike justeringer må kun utføres av fagfolk.

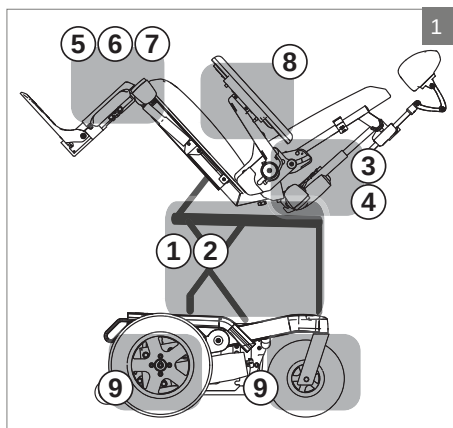

2.3 Bevegelige deler

⚠ Advarsel!

Kontakt med de bevegelige delene til rullestolen skal unngås. En rullestol har bevegelige og roterende deler. Kontakt med bevegelig deler kan resultere i alvorlige personskader eller skader på rullestolen.

Bevegelige/roterende deler:

1. Elektrisk tilt
2. Elektrisk hev/senk
3. Elektrisk justerbar rygg
4. Elektrisk justerbar ryggstøtte uten avkledningseffekt
5. Elektrisk vinkelstillbare beinstøtter
6. Elektrisk vinkelstillbarsentermontert beinstøtte
7. Elektrisk vinkelstillbar sentermontert beinstøtte og elektrisk høydejustering
8. Oppfellbare armlener
9. Hjul (triller og svinger)

3 Generell beskrivelse

3.1 Produktbeskrivelse av Sedeo Pro+

Rullestolen er utstyrt med et Sedeo Pro+ setesystem. Setesystemet Sedeo Pro+ gir ypperlig støtte for hodet, overkroppen, armene og benene. Den optimale støtten av kroppen gir rullestolbrukeren maksimal uavhengighet. Rullestolen må justeres av en kvalifisert spesialist. Feil innstillinger kan ha negativ påvirkning på sittestillingen.

⚠ Forsiktig!

Les denne brukermanualen nøye før du bruker setesystemet.


4 Bruk

4.1 Justering av setesystemet (av brukeren/ledsageren)

Komfortbeinstøtter knevinkel


Vinkelen til komfortbeinstøttene kan justeres uavhengig av hverandre.

1. Skyv spaken (A) forover.
2. Løft beinet.
3. Slipp spaken når beinstøtten står i ønsket posisjon.

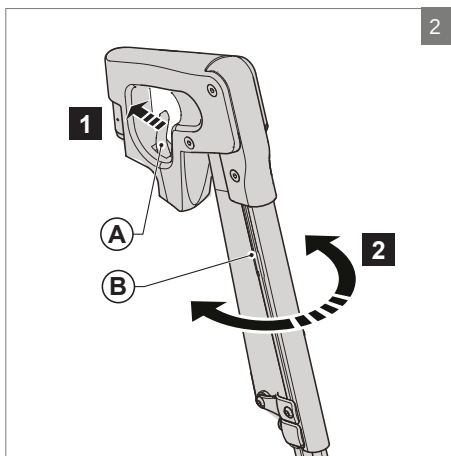

Flytte styreboksbraketten innover

1. Skyv (A) innover til du hører et klikk.

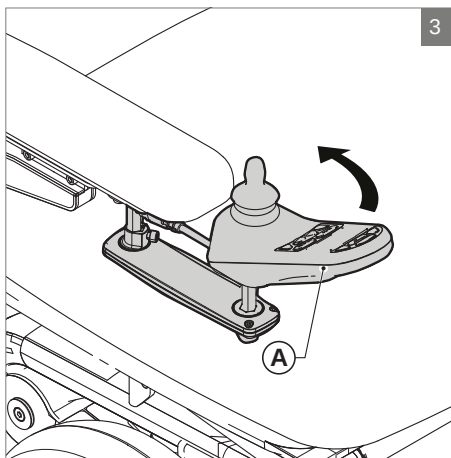


Sving styreboksbraketten til siden.

1. Skyv (A) utover til du hører et klikk.

Merk!

Hvis du svinger styreboksbraketten tilbake, vil du kunne sette deg inn til et bord. Du kan fortsatt bruke styreboksen som før.

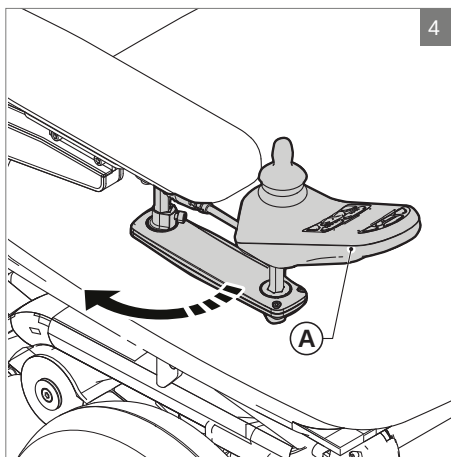


Hemiplegia-armlene

1. Trekk (A) ut av låst posisjon og dreii (B) til ønsket posisjon.

Merk!

Forsikre deg om at (B) er skikkelig sikret!

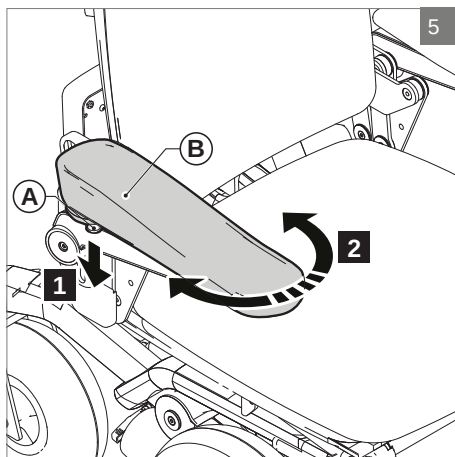

4.2 Komme seg inn og ut av rullestolen (overføring)


Overføring forover

⚠ Advarsel!

Ikke stå på fotplatene. Hvis du setter din fulle vekt på fotplatene, kan det føre til skader på rullestolen og farlige situasjoner, som at rullestolen tipper over.


Sving ut og/eller ta av standardbeinstøttene.

1. Skyv (A) bakover.
2. Sving (B) ut.
3. Ta av (B).

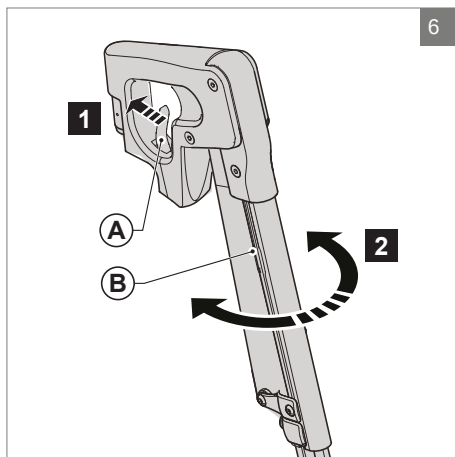

Slå opp den (elektriske) midtre fotplaten til beinstøtten

1. Slå opp (A).

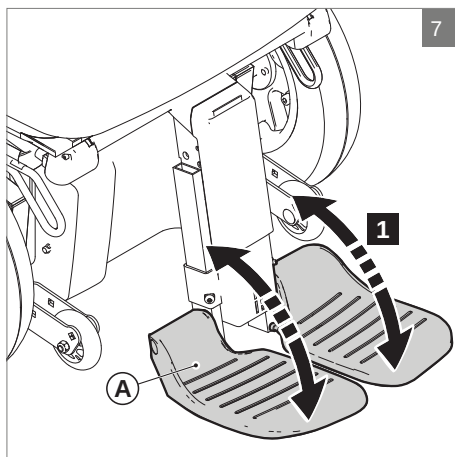


Overføring sidelengs

Folde tilbake armleneenheten

1. Fell (A) tilbake.

⚠ Forsiktig!

Ta av brettet før du folder tilbake armleneenheten.

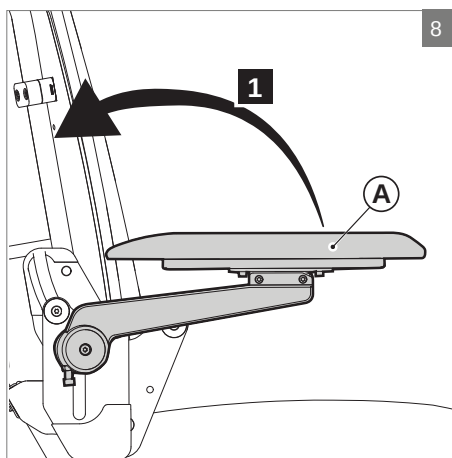


4.3 Alternativer / ekstrautstyr

Fjerne/plassere hodestøtten

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (B) ut av eller inn i mottakeren.
3. Stram til (A).


Merk!

Skyv alltid hodestøtten til den stopper i braketten.

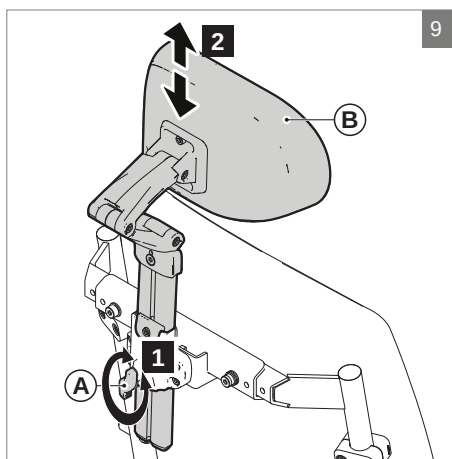

Fjerne sideputen

1. Løsne (A) to omdreininger
2. Skyv (B) opp
3. Stram til (A) to omdreininger når sideputen settes på igjen.

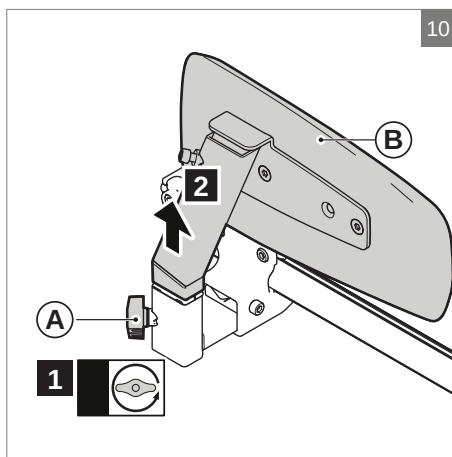

Fell ned abduksjonsklossen


1. Trekk (A) ut av låst posisjon og fell ned (B)
2. Slipp (A).

Fell opp abduksjonsklossen


3. Trekk (A) ut av låst posisjon og fell opp (B).
4. Slipp (A) i låst posisjon.

Merk!

Forsikre deg om at (B) er skikkelig sikret!

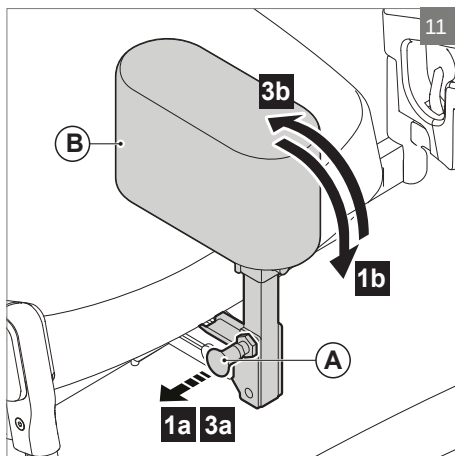**Felle ut sidestøtten**

1. Trykk inn (A) for å felle ut (B).

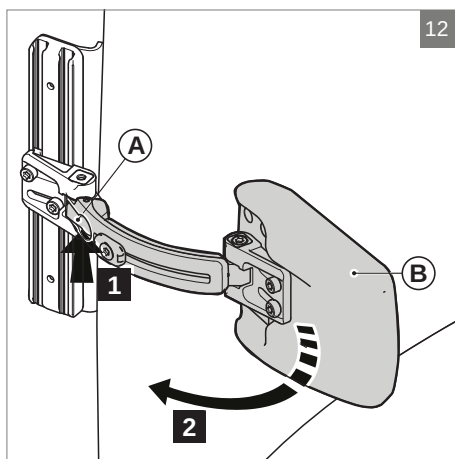

5 Justering av setesystemet (må utføres av fagfolk)

Merk!

Det finnes kalibreringsmerker flere steder på setesystemet. Fabrikkinnstillingene er markert

5.1 Setebredde

1. Skru løs (A) (ved hjelp av stjernenøkkelen) og (B).
2. Juster til ønsket setebredde.
3. Plasser (A) (ved hjelp av stjernenøkkelen) og (B) i nye hull og stram til.

Merk!

Juster først den ene siden og deretter den andre.

5.2 Setedybde

Justering av ryggstøtten

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket posisjon.
3. Stram til (A).




⚠ Advarsel!

Rullestolens stabilitet påvirkes av justeringen av setesystemets tyngdepunkt.

Slike justeringer må kun utføres av fagfolk.

Justering av setesystemet

1. Fjern setet (se "Bruk – Redusere størrelsen til setesystemet ved transport").
2. Fjern skruene (B).
3. Flytt (C) og (D).
4. Skru til skruene (B).
5. Skift setet (se "Bruk – Sette opp setesystemet etter transport").

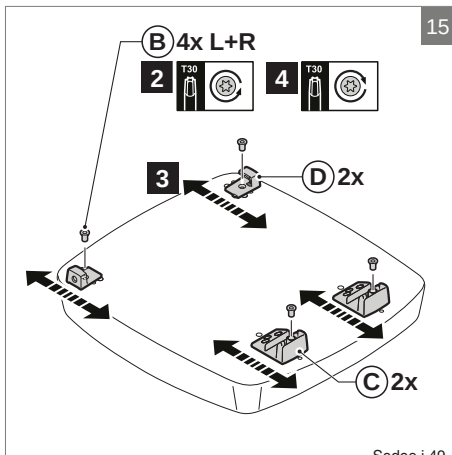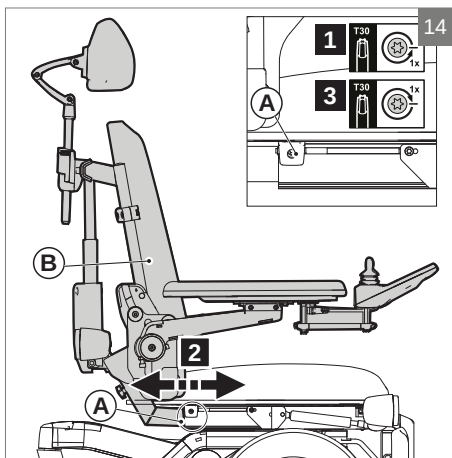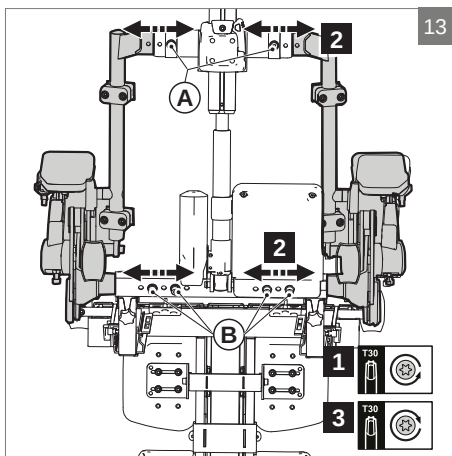


5.3 Rygghøyde

Merk!


Løsne først borrelåsklassen på ryggen fra seterammen.

Høyde (1)

1. Løsne de 8 skruene (A) én omdreining.
2. Juster ryggen til ønsket posisjon.
3. Stram til de 8 skruene (A).

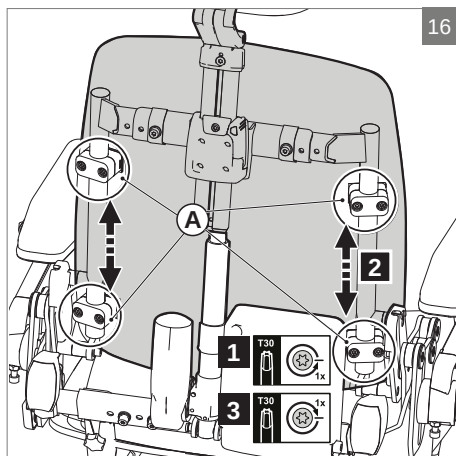
Høyde (2)


1. Fjern de 8 skruene (A, venstre og høyre).
2. Fjern de 4 klemmene på ryggstøtteputen
3. Det er ekstra monteringshull i treplaten i ryggstøtten (B). Lag hull i stoffet på ønsket sted.
4. Monter klemmene på ryggstøtten
5. Monter ryggstøtten på rammen ved å trekke til de 8 skruene (A).

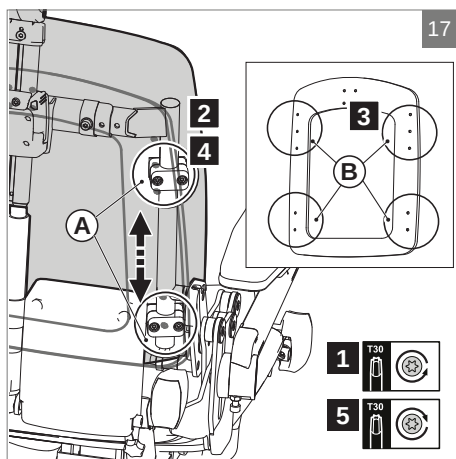

5.4 Standardbeinstøtte og manuelt heisbar beinstøtte

Bredde på beinstøttene

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (B) til ønsket posisjon.
3. Stram til (A).

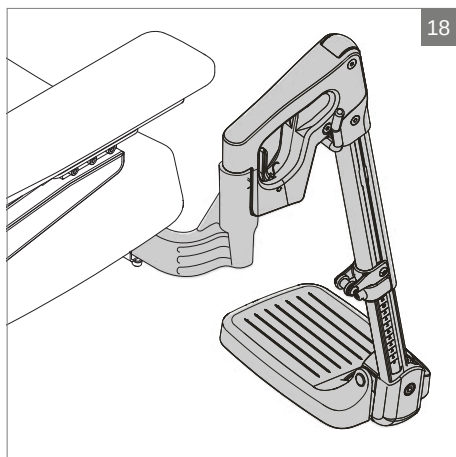


Lengde på nedre bein

1. Løsne settskruen (A) noen få omdreininger med en 4 mm unbrakonøkkel.
2. Skyv fotplaten (B) i ønsket posisjon.
3. Trekk til settskruen (A) godt.


⚠ Forsiktig!

Forsikre deg om at det er nok ledig plass under (B) til at rullestolen kan kjøre over hindringer.

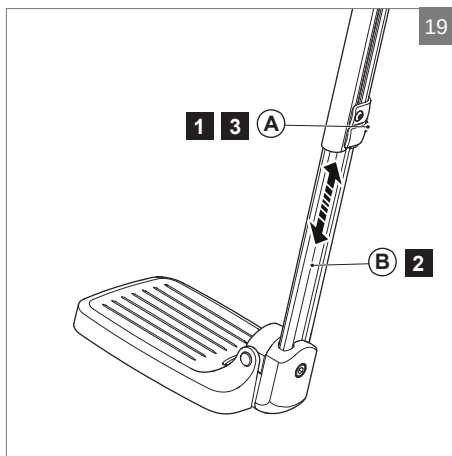

Fotplatevinkel

1. Løsne unbrakobolten (A) noen få omdreininger.
2. Juster den ønskete fotplatevinkelen (B).
3. Trekk til (A) godt. anuelt.
4. Trekk til unbrakobolten (C) godt.

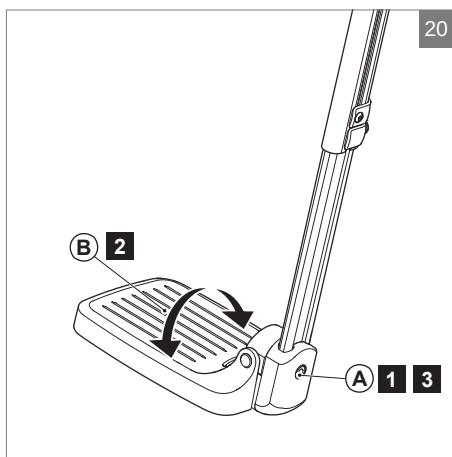

Leggputehøyde

1. Løsne unbrakobolten (A) noen få omdreininger med en 4 mm unbrakonøkkel.
2. Skyv leggputen (B) i ønsket posisjon.
3. Trekk til unbrakobolten (A) godt.

Leggputehøyde


1. Løsne unbrakobolten (A) noen få omdreininger med en 4 mm unbrakonøkkel.
2. Skyv leggputen (D) i ønsket posisjon.
3. Trekk til (A) godt.

Leggputedybde

4. Løsne (B) noen få omdreininger.
5. Skyv leggputen (D) i ønsket posisjon.
6. Trekk til (B) godt.

Leggputebredde

7. Løsne (C) noen få omdreininger.
8. Skyv leggputen (D) i ønsket posisjon.
9. Trekk til (C) godt.

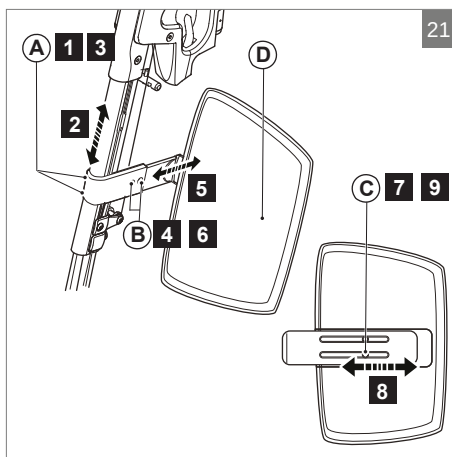


5.5 Midtre beinstøtte

Lengde på nedre bein

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (B) til ønsket posisjon.
3. Stram til (A).

⚠ Forsiktig!

Forsikre deg om at det er nok ledig plass under (B) til at rullestolen kan kjøre over hindringer.

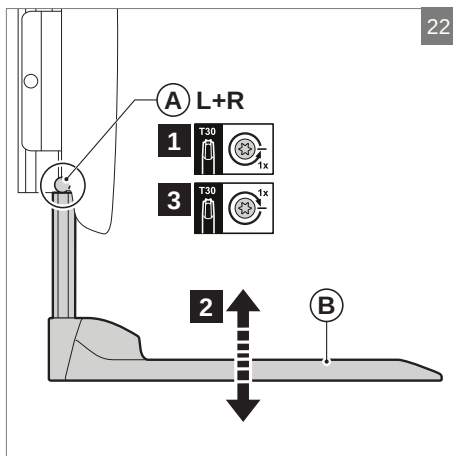


Knevinkel

1. Løsne (A) ved å skru to omdreininger.
2. Juster (B) til ønsket vinkel.
3. Stram til (A) ved å skru to omdreininger.


⚠ Forsiktig!

Endre høyden eller knevinkelen hvis fotplaten berører de svingbare hjulene.

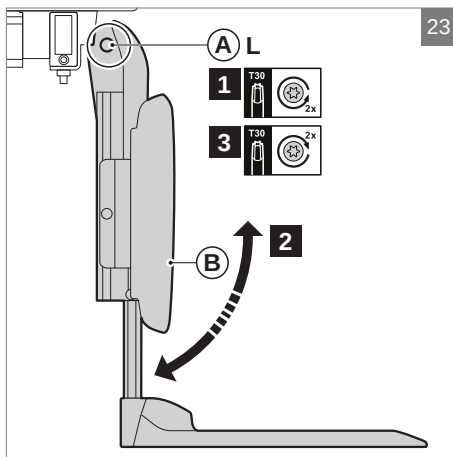


Ankelvinkel

1. Slå opp (A).
2. Dreie (B) for å justere ankelvinkelen som ønsket.
3. Fold ned (A).

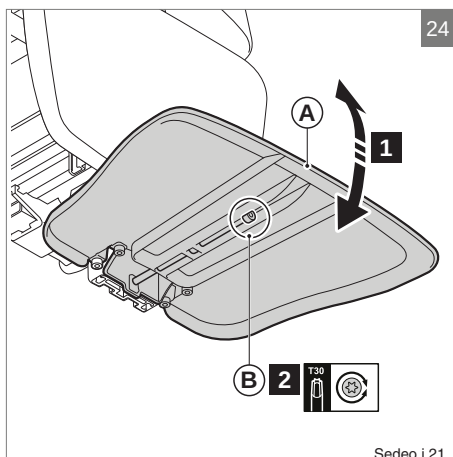

Høyde til leggpute

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (B) til ønsket posisjon.
3. Stram til (A).

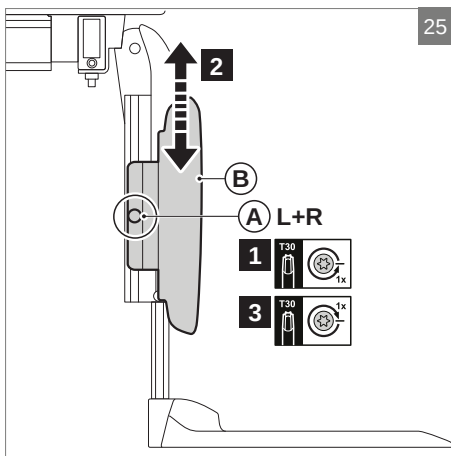


5.6 Elektrisk midtre beinstøtte

Lengde på nedre bein

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (B) til ønsket posisjon.
3. Stram til (A).


⚠ Forsiktig!

Forsikre deg om at det er nok ledig plass under (B) til at rullestolen kan kjøre over hindringer.

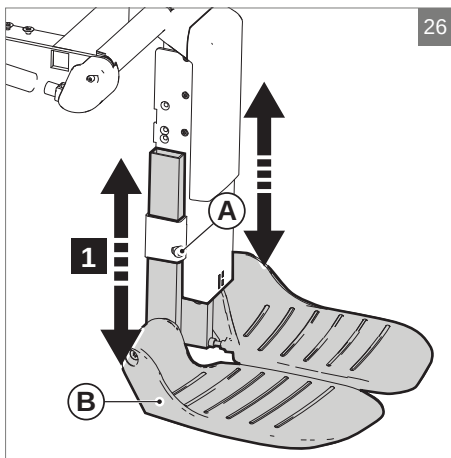


Ankelvinkel

1. Slå opp (A).
2. Drei (B) for å justere ankelvinkelen som ønsket.
3. Fold ned (A).

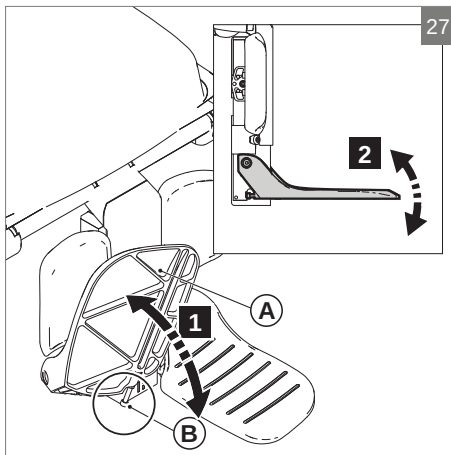


Leggpute høyde (1)


1. Lengde på nedre ben
2. Skru løs (A) (2x)
3. Juster (B) til ønsket høyde og flytt (A) til høyere/lavere hull (C)
4. Stram til (A) (2x)

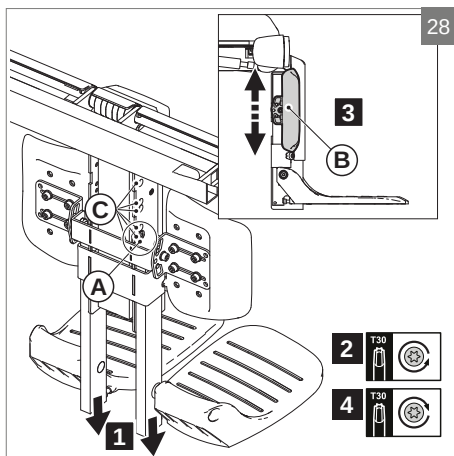**Leggpute høyde(2)**

1. Skru løs (A)
2. Juster (B) til ønsket høyde og flytt (A) til et høyere/lavere hull.
3. Stram til (A)

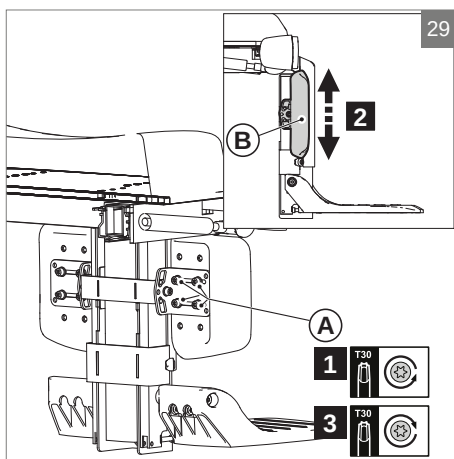
**Leggpute bredde**

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (B) til ønsket posisjon.
3. Stram til (A).

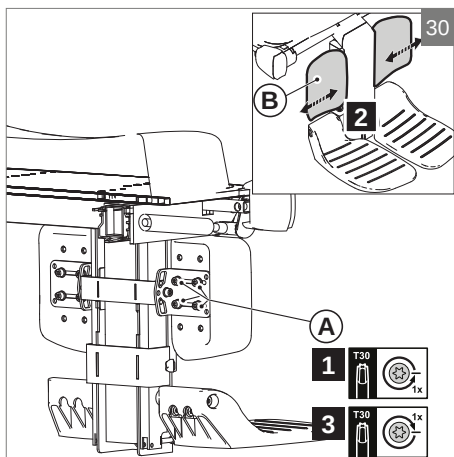

Leggputedybde


1. Skru løs (A)
2. Juster (B) til ønsket dybde og flytt (A) til et nytt hull.
3. Stram til (A)

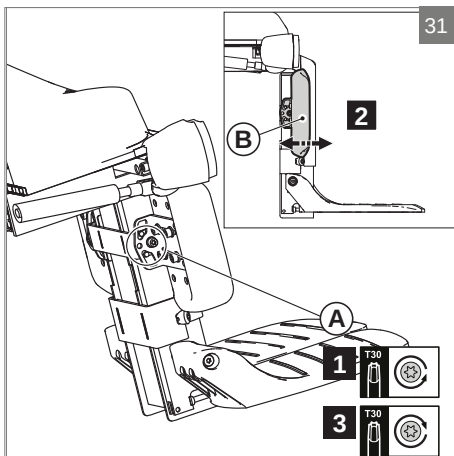**5.7 Armleneenhet****Merk!**


Forsikre deg om at armene er godt støttet uten at skuldrene dyttes oppover.

Armlenehøyde (1)

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket posisjon.
3. Stram til (A).

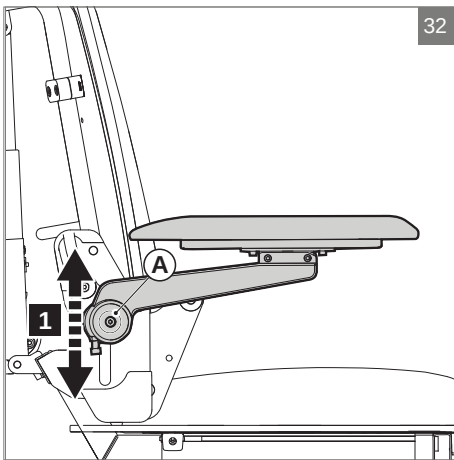**Armlenehøyde (2)**


1. Drei skru A for å stille inn armlenehøyden
2. Løsne B én omdreining
3. Juster armlenevinkelen
4. Stram til (B)

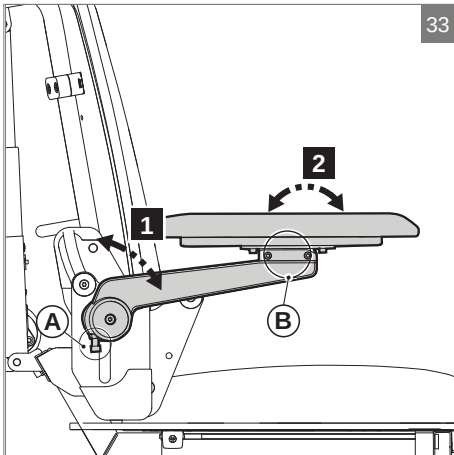


Armlenedybde (1)**Merk!**

Hvis du ikke kommer til skruene (A), justerer du først armlenevinkelen.

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (B) til ønsket posisjon.
3. Stram til (A).

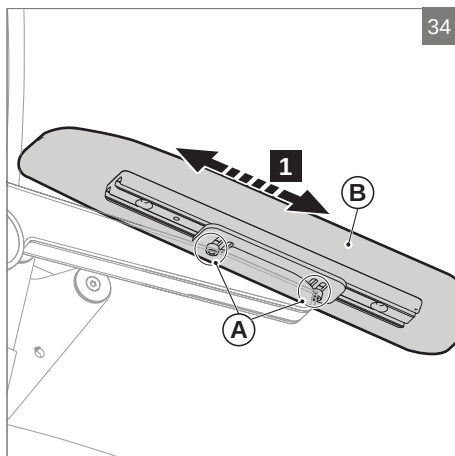
**Armlenedybde (2) (kun armlenepute 40 cm)**

1. Løsne (A).
2. Plasser (B) i ønsket posisjon
 - a Øke armlenedybden
 - b Redusere armlenedybden
3. Stram til (A).

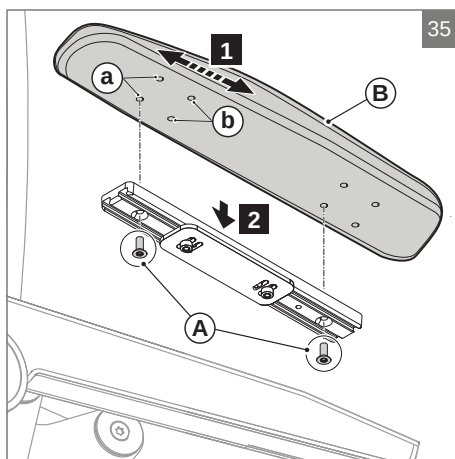**Armlenebredde (1)****Merk!**

Hvis du ikke kommer til skruene (A), justerer du først armlenevinkelen.


1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (B) til ønsket bredde.
3. Stram til (A).

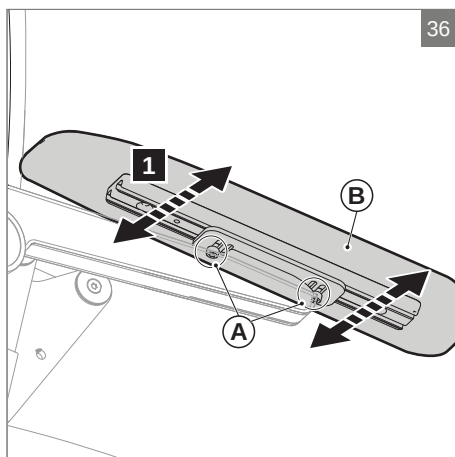

Armlenebredde (2)

For å fjerne:

1. Fjern (A) og (B).
2. Fjern (C) og (D).

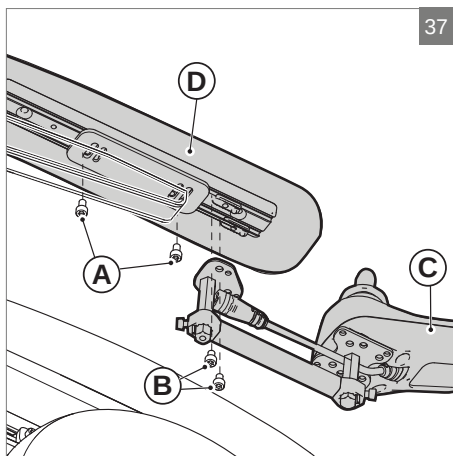


Til posisjon:

3. Skyv (D) inn på (E).

Merk!


Påse at sporet i festeplaten passer inn i åpningen.

4. Juster dybden til (D) og stram til (A).
5. Sett på plass styreboksbraketten og stram til (B).

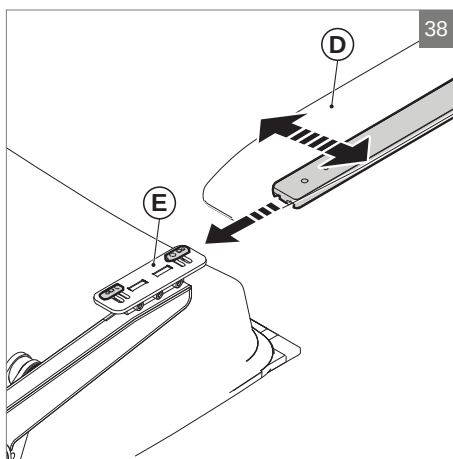


Armlenebredde (3)

1. Løsne (A).
2. Plasser (B) i ønsket posisjon
 - a Venstre: Redusere armlenebredde
 - a Høyre: Øke armlenebredde
 - b Venstre: Øke armlenebredde
 - b Høyre: Redusere armlenebredde
3. Stram til (A).

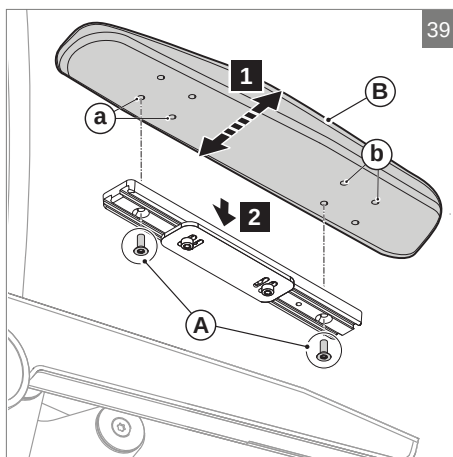

Armlene, horisontal vinkel

1. Løsne (A).
2. Juster (B) til ønsket posisjon
Ved å plassere (A) i ulike posisjoner på (C)
kan ytterligere en horisontal vinkel oppnås

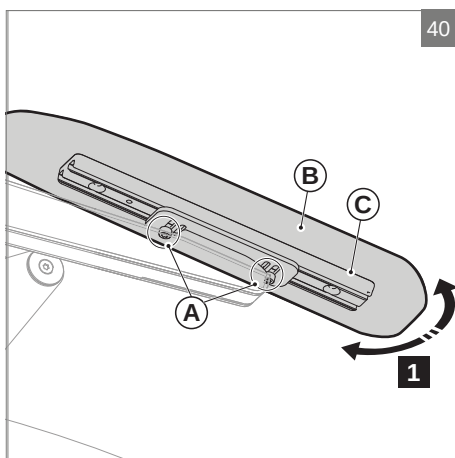**Sidepute**


Juster sideputen på følgende måte:

1. Løsne Torx-skruen.
2. Juster til ønsket posisjon.
3. Stram til Torx-skruen

A/a. Justering av høyden

B/b. Justering av bredden

C/c. Justering av dybden

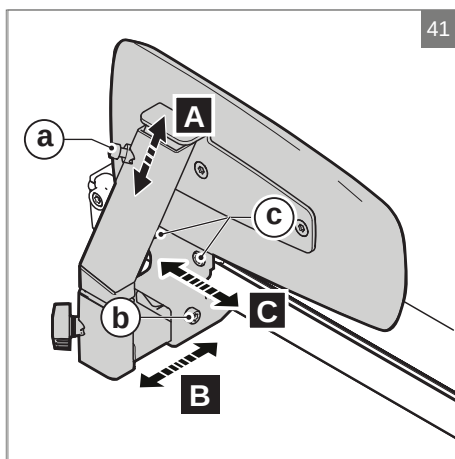**5.8 Justere tyngdepunktet****⚠ Advarsel!**


Hvis du endrer rullestolens tyngdepunkt, kan det påvirke rullestolens kjøreegenskaper og/eller den dynamiske stabiliteten negativt. Slike justeringer må kun utføres av fagfolk.

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (B) forover eller bakover.
3. Stram til (A).

Merk!

Hvis brukeren har en gjennomsnittlig vektfordeling, bør tyngdepunktet justeres til samme innstilling som setedybden.


Løsne setedybdejusteringen, for å slide bedre.

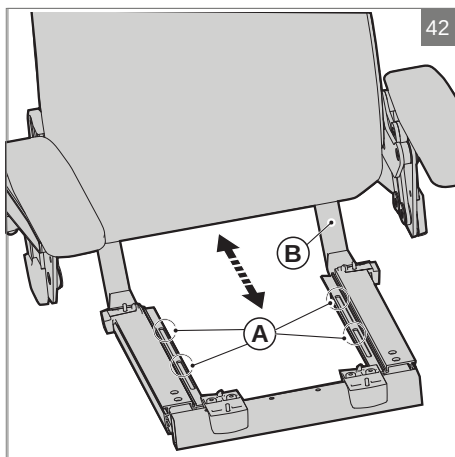

5.9 Hodestøtte

Justere minneinnstillingene / Høyde til hodestøtten

1. Løsne (A).
2. Løsne (C) ved å skru én omdreining.
3. Skyv (B) til ønsket posisjon.
4. Skyv (D) så langt ned som mulig.
5. Stram til (A).
6. Stram til (C).

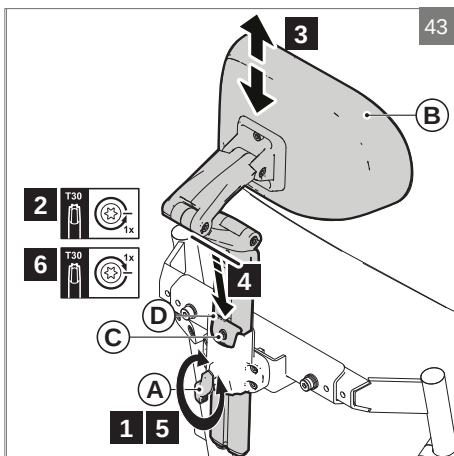


Posisjon til hodestøtten

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket posisjon.
3. Stram til (A).


Merk!

Juster høyden til hodestøtten og vipp hodestøtteputen bakover som ønsket.

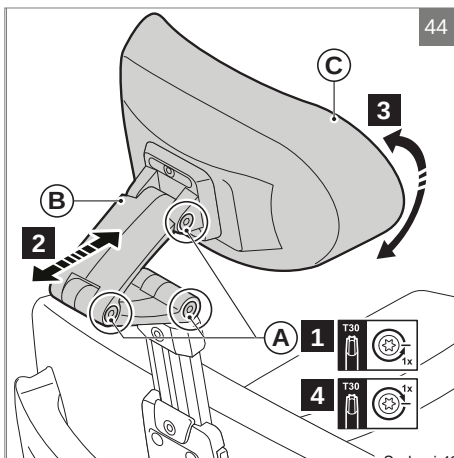

Bredde til hodestøtteputen


1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (B) til ønsket posisjon.
3. Stram til (A).

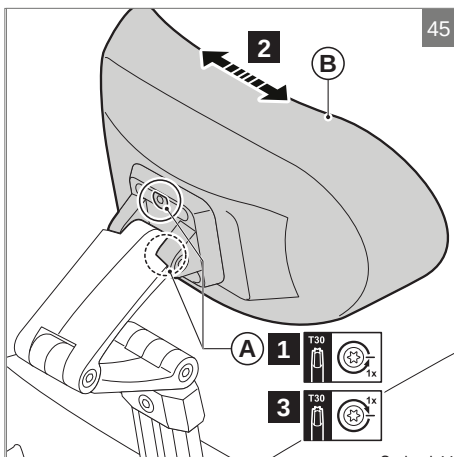

5.10 Fast/svingbar styreboksbrakett


Dybde

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (B) til ønsket posisjon.
3. Stram til (A).

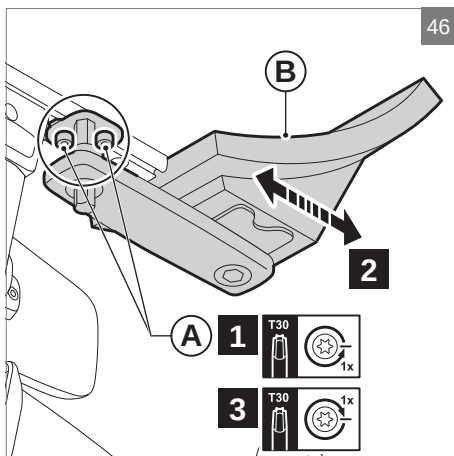


Høyde (1)

1. Løsne (A) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (B) til ønsket posisjon.
3. Stram til (A).

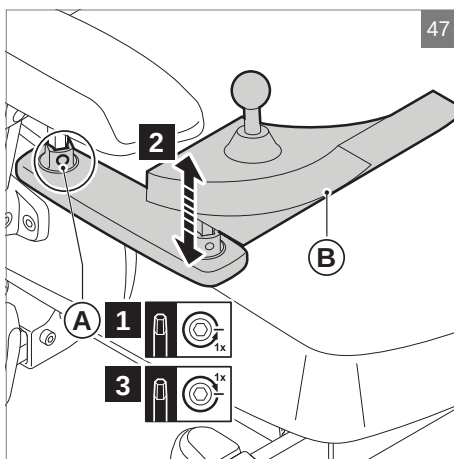

Høyde (2)

1. Løsne (C) ved å skru én omdreining.
2. Skyv (D) til ønsket posisjon.
3. Stram til (C).

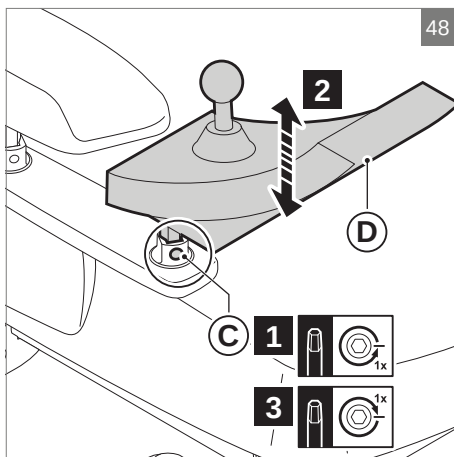


5.11 Ryggstøtte med justerbare stropper – fleksible

Ryggstøttesidene med justerbare stropper kan justeres på følgende måte:


1. Løsne de 8 Torx-skruene.
2. Juster sidene til ønsket posisjon.
3. Stram til de 8 Torx-skruene.

A/a. Justering av vinkelen.

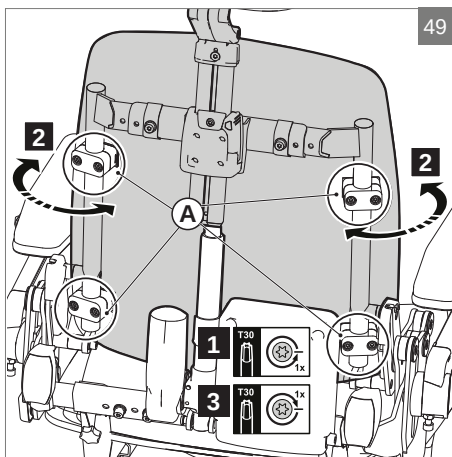


5.12 Justering av kurvatur på velcroygg

1. Løsne alle stroppene litt før du begynner å justere ryggen. Start med de nederste stroppene og jobb deg oppover.

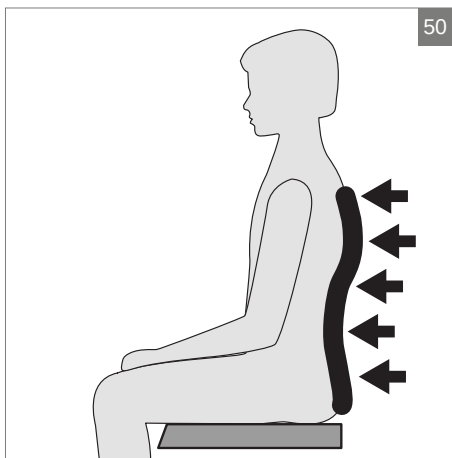

2. Stram eller løsne stroppene (A) slik at brukeren får maksimum komfort og støtte.

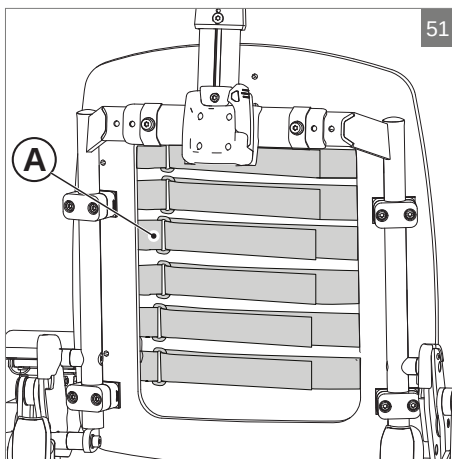


5.13 Lårstøtte

Juster lårstøtten på følgende måte:

1. Løsne Torx-skruen.
2. Juster delen til ønsket posisjon.
3. Stram til Torx-skruen.

A/a. Justering av dybden
B/b. Justering av bredden

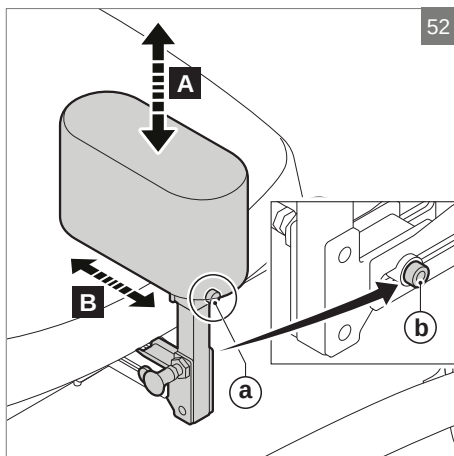


5.14 Sidestøtte


Juster sidestøtten på følgende måte:

1. Løsne Torx-skruen.
2. Juster til ønsket posisjon.
3. Stram til Torx-skruen.

A/a. Grovjustering av bredden
B/b. Justering av høyden

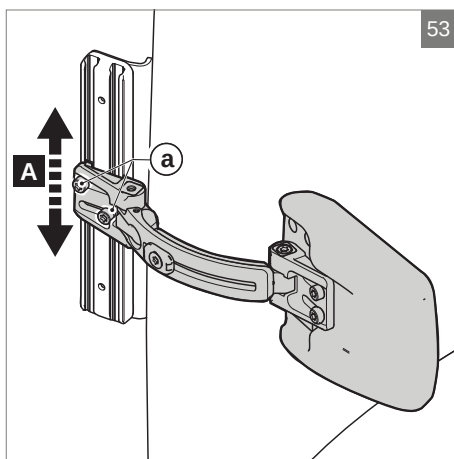


A/a. Justering av brakettedybden
B/b. Justering av putedybden

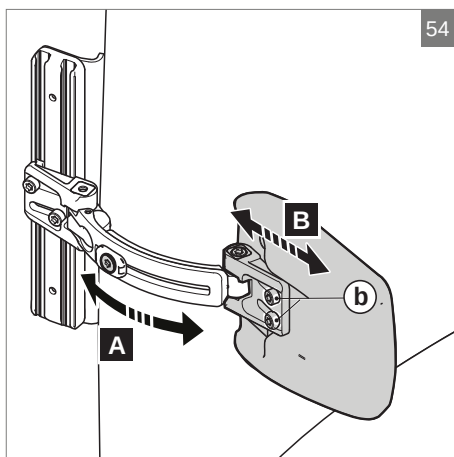

A/a. Justering av putevinkelen


B/b. Finjustering av bredden

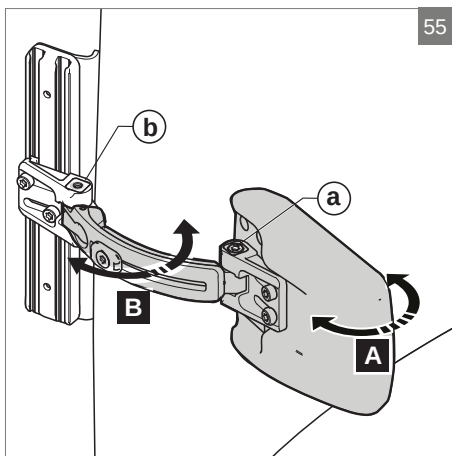

5.15 Feste hoftebeltet

Feste til seterammen

1. Fest (A) til seterammen med en skrue på venstre og høyre side.

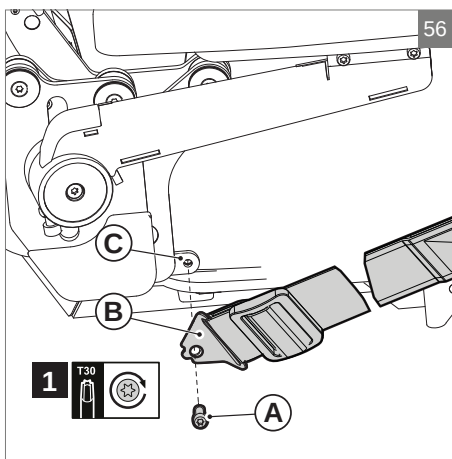

⚠ Advarsel!


Forsikre deg om at hoftebeltet er justert til brukeren av rullestolen. Beltet må sitte stramt over hoftene med en vinkel på ca. 45°.

Forsikre deg om at beltet er rent til enhver tid og at låsemekanismen fungerer skikkelig. Beltet og låsemekanismen kan rengjøres med en fuktig klut.


Hvis beltet er festet over hoftene og på tvers av den myke delen av magen til brukeren, kan det føre til feil sittestilling og at brukeren sklir ned i setet.

Bruk aldri hoftebeltet som et sikkerhetsbelte under transport.

57

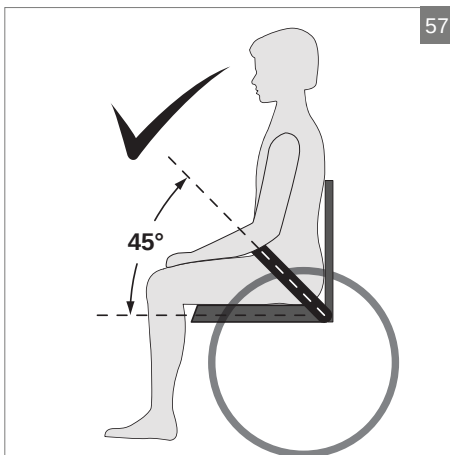

58

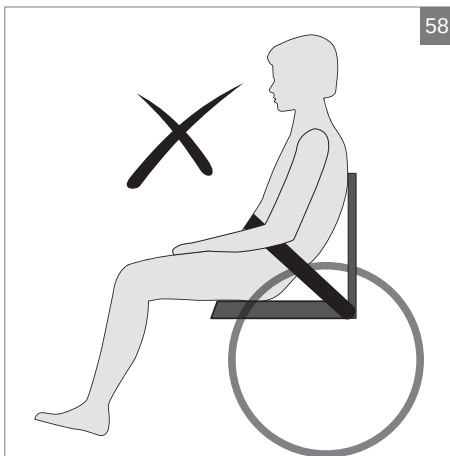

6 Transport

6.4 Redusere størrelsen til setesystemet ved transport



- A. Fjern hodestøtten. Se 4.3 Alternativer/tilbehør (1,3 kg)
- B. Fjern seteputen (2,5 kg)
- C. Vipp opp armlenet
- D. Fell ryggstøtten helt forover
- E. Fjern beinstøtten eller fell opp fotplatene

⚠ Advarsel!

Rullestolens størrelse kan reduseres ved transport når ingen seter i den. Alle deler som enkelt kan tas av av setesystemet, bør fjernes. Lagre slike deler sikkert, slik at de ikke kan forårsake skade på personer eller utstyr.


Fjerne setet

1. Trekk (A) oppover og forover.

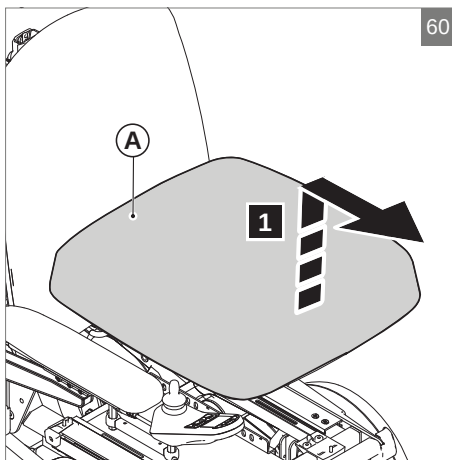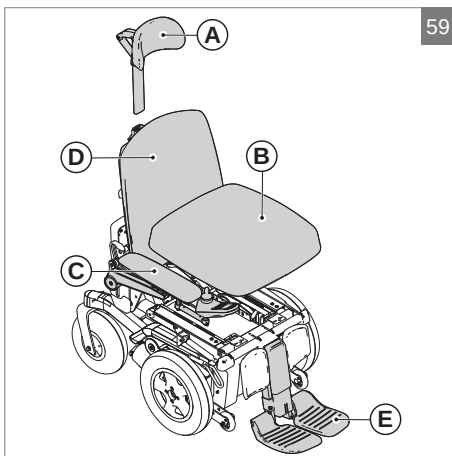

Vipp opp armlenet

1. Vipp opp armlenet (A)
2. Lås armlenet (B)

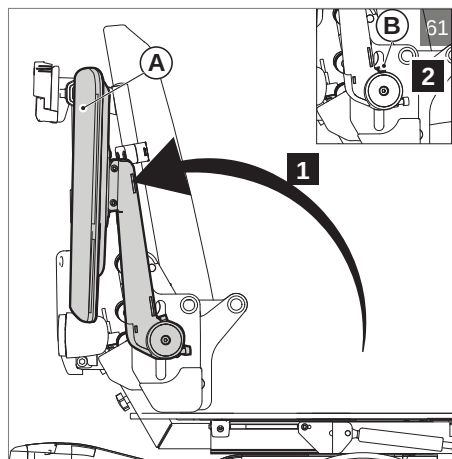

Fell ryggstøtten helt forover

1. Løsne knottene (A) nederst på ryggen.
2. Løft ryggstøtten 60° opp (B)


Merk!

Ryggstøtten er tung.


⚠ Advarsel!

Unngå å klemme fingrene når ryggstøtten løftes.

3. Fell (B) helt forover.

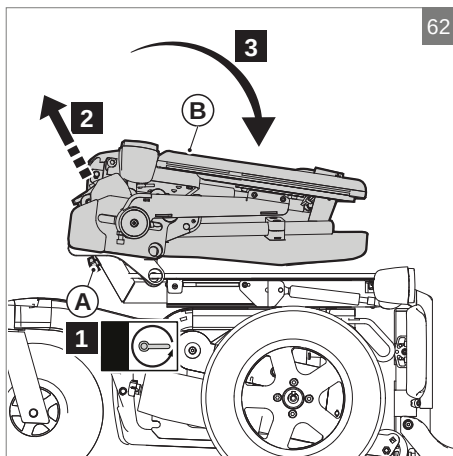**Ta av beinstøtten**


1. Skyv (A) bakover.
2. Sving (B) til siden.
3. Ta av (B).

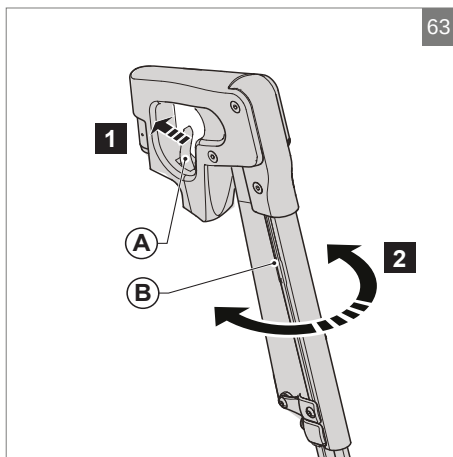**6.5 Sette opp setesystemet etter transport****Sette på plass standardbeinstøttene**

1. Sett beinstøtten (A) i braketten.
2. Sving beinstøtten innover.

⚠ Forsiktig!

Et klikk skal høres når beinstøtten settes på plass. Dette indikerer at beinstøtten er låst på plass.

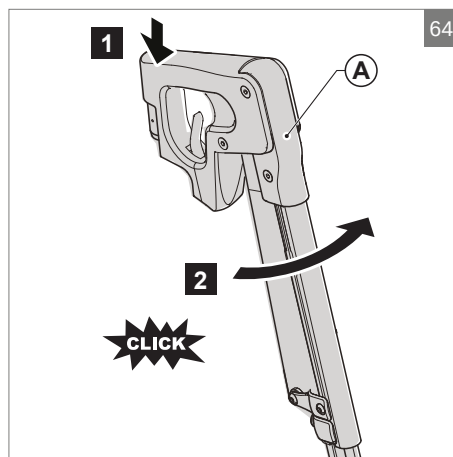


Sette på plass ryggstøtten for bruk

1. Fold (A) oppover og bakover. Ryggstøtten faller på plass av sin egen vekt.
2. Stram til låserattene (B).


⚠ Advarsel!

Unngå at fingrene kommer i klem mens ryggen løftes.

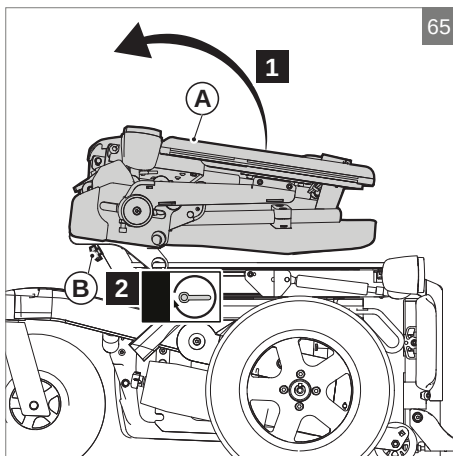

Posisjonere armlenet

1. Låse opp armlenet (A)
2. Vipp ned armlenet (B)

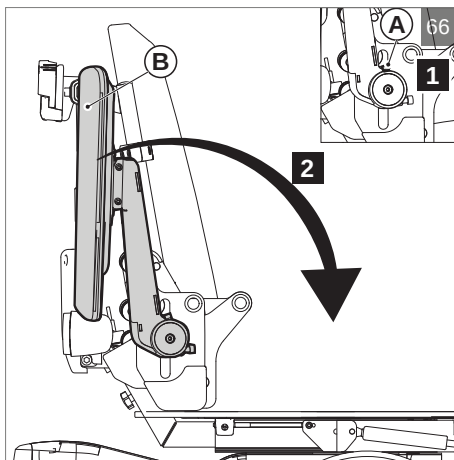


Sette på plass seteputen

1. Skyv (A) og (B) over (C) og (D).
2. Skyv (E) nedover.

⚠ Forsiktig!

Forsikre deg om at (C) og (D) på baksiden av setet hektes på under skruehodene.

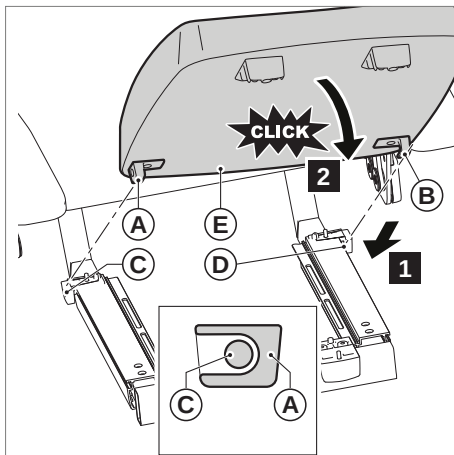

7 Vedlikehold

Vi anbefaler at din forhandler utfører service på din rullestol én gang året, eller hver sjetten måned ved intensivt bruk.

7.1 Rengjøring av polstringen

Rengjør polstringen med en fuktig klut og husholdningssåpe. Tørk av med en myk, tørr klut.

PU-deler

Rengjør armlenene, sideputene o.l. med en fuktig klut og husholdningssåpe. Tørk av med en myk klut.

Polstring til armlenepute

Trekkene er avtakbare og vaskbare.

Polstring på sete og ryggstøttepute

Trekkene er avtakbare og vaskbare. Følg

vaskeanvisningene på trekkene:

For inkontinenstrekket se figur 68.

For komforttrekket se figur 69.

⚠ Advarsel!

Ikke bruk organiske løsemidler som tynner, benzen eller White spirit.

Ikke utfør kjemisk rengjøring av polstringen.
Ikke stryk eller trommeltørk polstringen.



8 Feilsøking

Kontakt forhandleren din hvis det oppstår et problem med setesystemet ditt.

9 Tekniske spesifikasjoner

9.1 CE-erklæring og -krav



Produktet er i samsvar med bestemmelsene til direktivene for medisinske enheter og har CE-merket.

Produktet tilfredsstiller også følgende krav og standarder. Dette har blitt verifisert av uavhengige testorganisasjoner.

3. EN 12183 (2009) Manuelle rullestoler eller EN 12184 (2009) Elektriske rullestoler.
4. ISO 7176-8 Krav og testmetoder for slag, statisk- og tretthetsbestandighet.
5. ISO 7176-9 Klimatester for elektriske rullestoler IPX4.
6. ISO 7176-16 Krav til motstand mot antennelse for polstrede deler.
7. ISO 7176-19 Krasjtester.
8. EN-ISO 10993-5 (1999-11) Biologisk vurdering av medisinske innretninger.
9. EN 1021 1,2 Vurdering av antennelighet for polstrede møbler. Tennkilde: glødende sigarett/ fyrstikkflamme eller lignende.

9.2 Teknisk informasjon

Beskrivelse	Enhet	Verdier
Setesystem		
Brukervekt	kg	160
Setebredde	mm	380 - 600
Setedybde	mm	440 - 600
Tyngdepunkt	mm	95
Ryggstøtte		
Ryggstøttehøyde	mm	480 - 670
Ryggvinkel	°	90 - 135
Armlene		
Bredde armlenepad	mm	-40 till +20
Høyde armlenepad fra seteramme	mm	240 - 360
Dybde armlenepad siden til styreboksbraketten	mm	95
Dybde armlenepad motsatt side av styreboksbraketten	mm	140
Sidestøtte		
Sidepute høyde	mm	100
Midtre beinstøtte		
Lengde på nedre bein (med sammenpresset setepute)	mm	330 - 495
Knevinkel*	°	30 - 110
Ankelvinkel	°	+20 till -40
Høyde til midtre leggstøtte (alternativ)	mm	120

Beskrivelse	Enhet	Verdier
Elektrisk midtre heisbare beinstøtte		
Lengde på nedre bein (med sammenpresset setepute)	mm	365 - 530
Knevinkel*	°	10 - 86
Maksimum lengdekompensasjon	mm	180
Ankelvinkel	°	+20 till -20
Høyde til leggstøtte	mm	90
Bredde til leggstøtte	mm	350 - 430
Standard beinstøtte (sett)		
Lengde på nedre bein (med sammenpresset setepute)	mm	340 - 510
Knevinkel*	°	70
Ankelvinkel	°	0 - 180
Elektrisk heisbar beinstøtte (sett)		
Lengde på nedre bein (med sammenpresset setepute)	mm	340 - 530
Knevinkel*	°	10 - 80
Ankelvinkel	°	0 - 180
Høyde til leggstøtte	mm	120
Hodestøtte		
Høyde til hodestøtte (minne)	mm	170
Dybde til hodestøtte	mm	180
Hodestøttens vertikale vinkel	°	-45 - 45
Brede til hodestøtte standard hodestøtte (alternativ)	mm	-20 - 20
Brede til hodestøtte med justerbar hodestøtte (alternativ)	mm	-110 - 110
Styreboksbrakett		
Høyde til styreboksbrakett	mm	60
Dybde til styreboksbrakett	mm	35
Svingbar styreboksbrakett		
Høyde til styreboksbrakett	mm	50
Dybde til styreboksbrakett	mm	35
Vinkel til styreboksposisjon	°	0 - 45
Hemiplegia		
Vinkel til Hemiplegia-armlene (alternativ)	°	0 - 45
Abduksjonsstøtte		
Høyde til abduksjonsstøtte	mm	60 - 120
Dybde til abduksjonsstøtte	mm	60 - 110
Bryststøtte		
Bredde til bryststøtte	mm	-60 - 0
Høyde til bryststøtte	mm	200 - 400
Dybde til bryststøtte	mm	20 - 70

* = 0 ° bena rett foran og 90 ° = ben i en rett vinkel ned

10 Garanti

Garanti- og ansvarsbestemmelsene som gjelder for setesystemet er identiske med de som er oppgitt i brukermanualen til rullestolen.

( Rullestol)

NO
Sunrise Medical AS
Dynamitveien 14B
1400 SKI
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



NL
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

Forhandler / distributør:

Serienummer:



OM_Sedeo_Pro+_EU_NO_RevB_2016_05_06

