

# Almofada JAY GS

## ESTABILIDADE, POSICIONAMENTO E CRESCIMENTO DO UTILIZADOR PEDIÁTRICO



# BASE FIRME DE ESPUMA, ADAPTÁVEL AO CESCIMENTO

A almofada JAY GS proporciona à criança um posicionamento completo durante o seu crescimento. A sua base firme de espuma com cavidade pélvica dá suporte à pélvis na posição adequada, garantindo a simetria pélvica e a curvatura fisiológica da coluna. Isto, juntamente com a tecnologia de fluído JAY e a possibilidade de se adaptar ao crescimento, convertem-na na solução ideal para crianças em idade de crescimento ou adolescentes.



A base de espuma da almofada JAY GS não necessita de manutenção, é de longa duração e facilmente modificável. Tem cortes frontais para facilitar a flexão dos joelhos nos isquiotibiais encurtados. Além disso, todos os seus componentes componentes, como a bolsa de fluído ou a capa podem-se adaptar para se manter o suporte correto durante o crescimento:

#### // AMPLA CAVIDADE PÉLVICA

que permite sentar inicialmente o utilizador na parte frontal da almofada e adaptar a posição à medida que vai crescendo.

#### // EXTENSOR PRÉ-ISQUIAL

que se pode juntar à medida que a criança vai crescendo para aumentar a longitude frontal da almofada e proporcionar suporte adicional para pernas mais compridas.

#### // BASE DE ESPUMA

com velcros na parte superior para poder incorporar e reajustar facilmente os acessórios de posicionamento conforme as necessidades clínicas.

\* Todas as almofadas Jay GS trazem de série um extensor pré-isquial. Mais extensores disponíveis como reposição.



## MÚLTIPLOS ACESSÓRIOS POSTURAIS DISPONÍVEIS

A almofada de posicionamento pediátrica JAY GS é compatível com uma grande variedade de cunhas de posicionamento de diferentes alturas, para um posicionamento superior. Como por exemplo:



## 2 OPÇÕES PARA A BOLSA DE FLUIDO JAY

Cada bolsa de fluido assegura a quantidade de fluido necessária sob as proeminências ósseas, para garantir o nível de posicionamento e proteção da pele necessário em cada caso.

Com o seu desenho oversize, a bolsa de fluido molda-se perfeitamente à base de espuma e aos acessórios de posicionamento. Além disso, não precisa de manutenção. Existem 2 opções diferentes conforme cada necessidade.



### // NOVA BOLSA DE FLUIDO STANDARD 3D:

O equilíbrio perfeito entre alívio de pressões e posicionamento



### // BOLSA DE FLUIDO OVERFILL:

Com maior quantidade de fluido, para máxima proteção da pele.



Almofada Jay GS com funda de incontinência



Almofada Jay GS com funda Microclimática

## OPÇÃO DE FUNDA DE INCONTINÊNCIA OU MICROCLIMÁTICA

A almofada Jay GS está disponível com funda de incontinência standard e funda de incontinência upsized, recomendada quando se utiliza os acessórios posturais de 7,5 cms. Também existe a opção de selecionar a funda microclimática que ajuda a dissipar o calor e a humidade para manter a integridade da pele.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Jay GS // Almofada anti escaras pediátrica

<b>Largura da almofada</b>	25 cm / 30 cm / 36 cm / 40 cm / 45 cm
<b>Profundidade da almofada</b>	33 cm / 38 cm / 43 cm / 48 cm / 50 cm
<b>Altura da almofada</b>	6,5 cm (sem acessórios de posicionamento)
<b>Peso máximo suportado</b>	150 kg
<b>Peso da almofada</b>	3,1 kg (36 x 43 com bolsa de fluido Overfill)
<b>Bolsa de fluido</b>	Standard 3D ou Overfill
<b>Funda</b>	Incontinência ou Microclimática
<b>Cunhas de posicionamento</b>	Opcionais (Altura de 2,5, 5 o 7,5 cms)

Para mais informações sobre opções e disponibilidades, por favor consulte o formulário de encomenda. Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos mesmos e as características indicadas sem aviso prévio.



#### Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34

Fax: +34 (0) 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)



Rev.1 - Junho 2016