



CIRRUS G5

Cirrus G5

HURTIGMANUAL

Når du mottar rullestolen




Rullestolen leveres i setebredder i intervallet 39-54 cm og setedybde 44-50 cm (+/- 5 cm sleidesete). Kontroller at rullestolen du har mottatt har korrekte mål i henhold til din bestilling. Angivelse av rullestolens mål finner du avmerket på krysset, under setet.




Rullestolen leveres komplett. Det eneste du trenger å gjøre er å folde opp ryggen og sette på armlener og benstøtter.

- Fell opp ryggen og sett i bolten **A**
- Sett på armlenene og benstøttene
- Legg seteputen (tilbehør) på plass, påse at den ligger riktig på seteplaten.

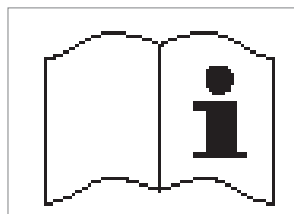

For din egen sikkerhet, og for å få best mulig utbytte av mulighetene i din nye rullestol, anbefaler vi at du leser brukermanualen nøye før du tar i bruk rullestolen.

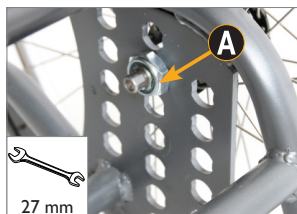

Setehøyde bak og balansepunkt

Setehøyden bak kan justeres i intervallet 47-52 cm (44,5-49,5 cm uten slidesete) (38-55 cm med bytte av deler).

Tyngdepunktet kan justeres for å tilpasse kjøreegenskapene til den enkelte.


- Løsne festemutteren **A**
- Flytt drivhjulshylsen til ønsket hull.
- Sett på festemutteren og trekk godt til

Setehøyde foran

Setehøyde foran justeres i samme intervaller som setehøyde bak.

Setehøyde foran kan endres på ulike måter:

- Bytte til større eller mindre svinghjul
- Bytte til kortere eller lengre svinghjulsgaffel

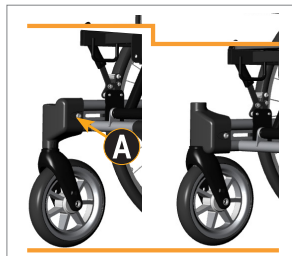

Snu lagerhuset


- Skru ut skruen **A**
- Demonter gaffel og hjul
- Snu lagerhuset 180° og monter det på motsatt side.
- Monter gaffel og hjul
- Skru til skruen **A**

- Flytte svinghjulet opp eller ned i svinghjulsgaffelen (avhengig av størrelse på svinghjul og svinghjulsgaffel)
- Snu lagerhuset 180° og flytte det til motsatt side
- Legge til eller fjerne avstandsstykker mellom lagerhus og gaffel



Legge til eller fjerne avstandshylser


- Demonter gaffel og hjul
- Legg til eller fjern avstandsstykker **A**
- Monter gaffel og hjul

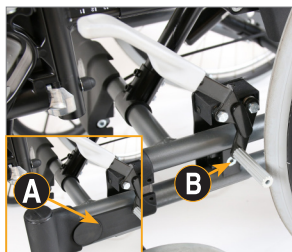

Innstilling av bremsene

Etter justering av setehøyde bak eller tyngdepunkt, er det viktig å kontrollere og/eller etterjustere bremsene.

- Ta av dekslet **A**
- Løsne skruen **B**
- Flytt bremsen etter sporet til ønsket posisjon. Riktig avstand mellom bremsekloss og hjul er ca 5 mm, når bremsen ikke er aktivert

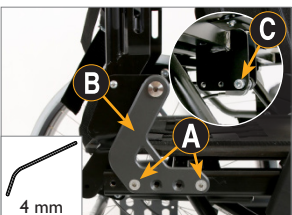

Setedybde

Setedybden kan justeres i tre steg 44, 47 og 50 cm ved å flytte ryggbraketten **B** fram- eller bakover. I tillegg gir slidesetet +/- 5 cm i setedybde.

- Fell ned ryggen slik at den hviler mot setet.
- Skru ut skruene **A** på begge sider av rullestolen. Flytt ryggbrakettene til ønsket posisjon og skru inn boltene igjen. Det må alltid være ett eller to åpne hull mellom boltene.
- Skru ut gassdemperskruen **C** og flytt til det hullet som samsvarer med hullene i ryggbraketten.






Hodestøtte

Hodestøtten reguleres i høyde, dybde og vinkel.

- Løsne låsehendlene **A**, reguler til ønsket dybde og vinkel og skru til hendlene
- Løsne låserattet **B**, hev eller senk hodestøtten til ønsket posisjon og skru til låserattet igjen




- Puten har innebygde bånd **C** som reguleres for å gi optimal støtte for hodet.

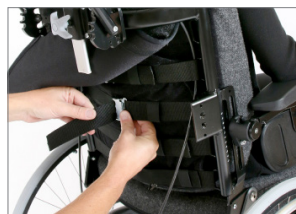

Ryggkurvatur


En godt polstret ryggpute gir god komfort over tid. Båndene i ryggen kan reguleres slik at rullestolryggen former seg for maksimal støtte og komfort. Du kommer til velcrobåndene ved å løsne ryggtrekket på baksiden av ryggen.

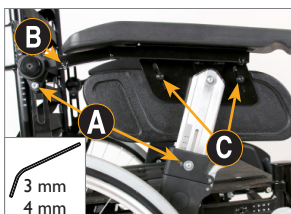

Justering av armlener

Armlenene, som følger ryggen ved ryggvinkelregulering, kan justeres i høyde, dybde og vinkel, for optimal støtte av armene.


- Juster høyden ved å løsne skruene **A**, hev eller senk armlenet til ønsket posisjon og stram til skruen igjen. Benytt måleskalaene som veiledning.
- Juster dybden ved å løsne skruen **B** og skyve armlenet til ønsket dybde. Når armlenet er justert til ønsket posisjon, kan du flytte klesbeskytteren for å unngå åpninger mot hjulet.
- Løsne skruene **C**, dra/skyv klesbeskytteren til ønsket posisjon og skru til skruene igjen

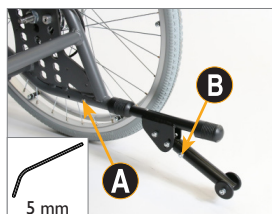

Justering av tippesikring

Juster tippesikringen når du har endret setehøyden eller tyngdepunktet på stolen.

- Skru ut skruen **A**. Dra eller skyv tippesikringen til riktig horisontal posisjon. Sett inn skruene og stram til
 - Skru ut skruene **B**. Dra eller skyv tippesikringen til riktig vertikal posisjon. Sett inn skruene og stram til
- (Illustrasjonen kan avvike fra tippesikringen som er montert på rullestolen)

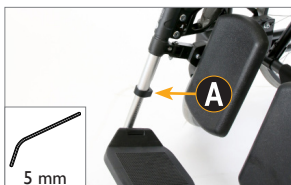

Benstøttelengde

Lengden ned til fotplaten kan justeres trinnløst.

- Løsne festeskruen **A** ca 5 mm. Juster benstøtten til ønsket lengde og stram til skruen igjen
- Benytt måleskalaen som veiledning



Tilt og ryggvinkel

Setetilt og ryggvinkel gir bruker mulighet for viktig stillingsendring i løpet av dagen. Hendene for rygg- og setevinkel er plassert på kjørebøylen.

- Reguler ryggvinkelen ved hjelp av den høyre hendelen.
- Tilt setet ved hjelp av den venstre hendelen



Tippesikring med vippestuss

Tippesikringen sikrer rullestolen mot å tippe bakover. Sørg alltid for at tippesikringen er aktivert når rullestolen er i bruk.

Deaktiver tippesikringen når du skal forserer fortauskanter eller lignende. Sett deretter en fot på vippestussen samtidig som du styrer med kjørehåndtakene. Husk å aktivere tippesikringen igjen etter forsering av hinder.



Krasjtestet

Rullestolen kan benyttes som passasjer sete i bil og er godkjent henhold til ISO 7176-19.


Rullestolen har avmerket fire festepunkter som må brukes ved fastspenning i motor kjøretøy.



Sleidesete

Bruk sleidesetefunksjonen for å regulere setedybden og for en enklere og mer skånsom forflytning av brukeren til/fra rullestolen.


- Sett setet i horisontal stilling
- Skyv hendelen A bakover samtidig som du tar tak i håndtaket B og drar eller skyver setet til ønsket posisjon.

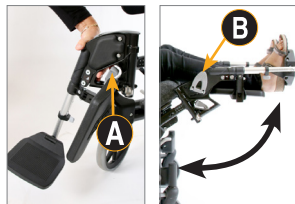

Vinkelstillbare benstøtter

Benstøttene er ut/innsving- og avtakbare for enklere forflytning til og fra rullestolen.

- Benstøtten løses ut ved å vri hendelen A inn- eller utover.
- Benstøtten kan løftes rett opp og tas helt av dersom dette er ønskelig. For å sette den på igjen, gjøres operasjonen i motsatt rekkefølge. Hendelen A låser automatisk.
- Benstøttvinkelen reguleres ved å svinge ut hendelen B og regulere til ønsket posisjon. Lås vinkelen ved å skyve hendelen tilbake.

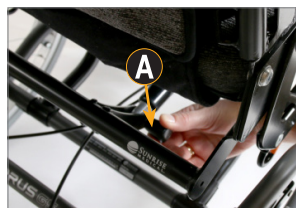


Felle ryggen opp og ned

Ryggen felles enkelt ned

- Tilt stolen framover.
- Ta av armlenene
- Trekk ut bolten A og fold ned ryggen.

Utfør prosedyren i motsatt rekkefølge for å felle opp ryggen.

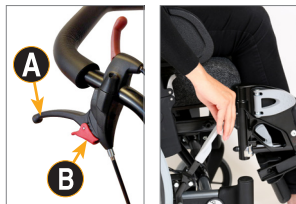

Ledsagerbrems

- Klem inn bremsehåndtakene A for å bremse
- Skyv utløserhendelen B fra deg for å sette bremsen i låst posisjon ved parkering. Klem utløserhendelen inn for å løse ut bremsen

Brems - brukerbetjente

Trekk bremsespaken mot deg når bremsen skal låses.

⚠ De brukerstyrte bremsene er kun konstruert for å holde stolen når denne skal stå stille. De må ikke brukes som kjørebrems.

I henhold til NAVs retningslinjer, skal hodestøtte monteres dersom rullestolen skal benyttes som passasjer sete i bil.

📖 Les mer om sikkerhet i bil i rullestolens brukermanual.



Sunrise Medical AS

Delitoppen 3

1540 Vestby

T: 66 96 38 00

F: 66 96 38 80

E: post@sunrisemedical.no

www.sunrisemedical.no