
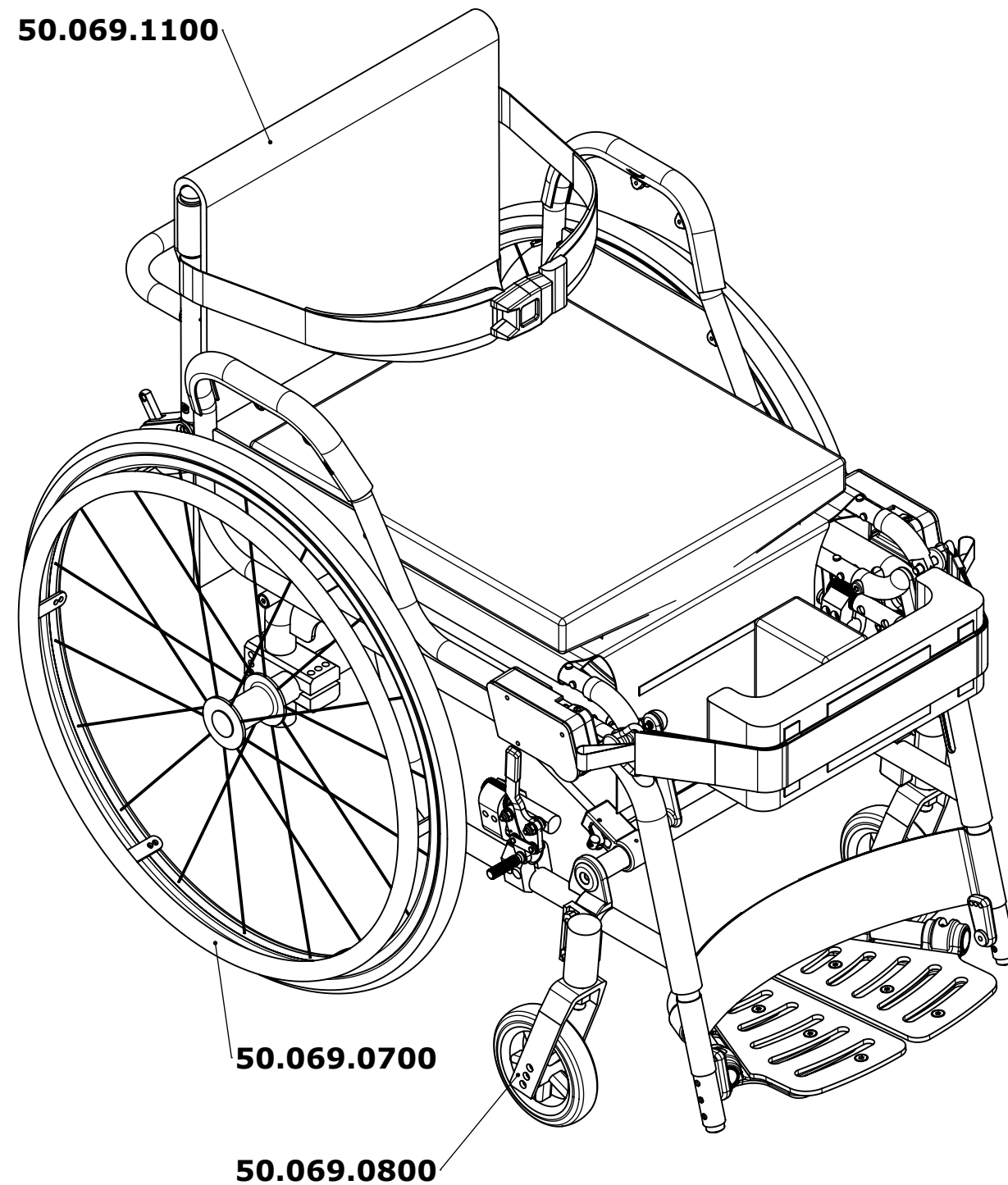


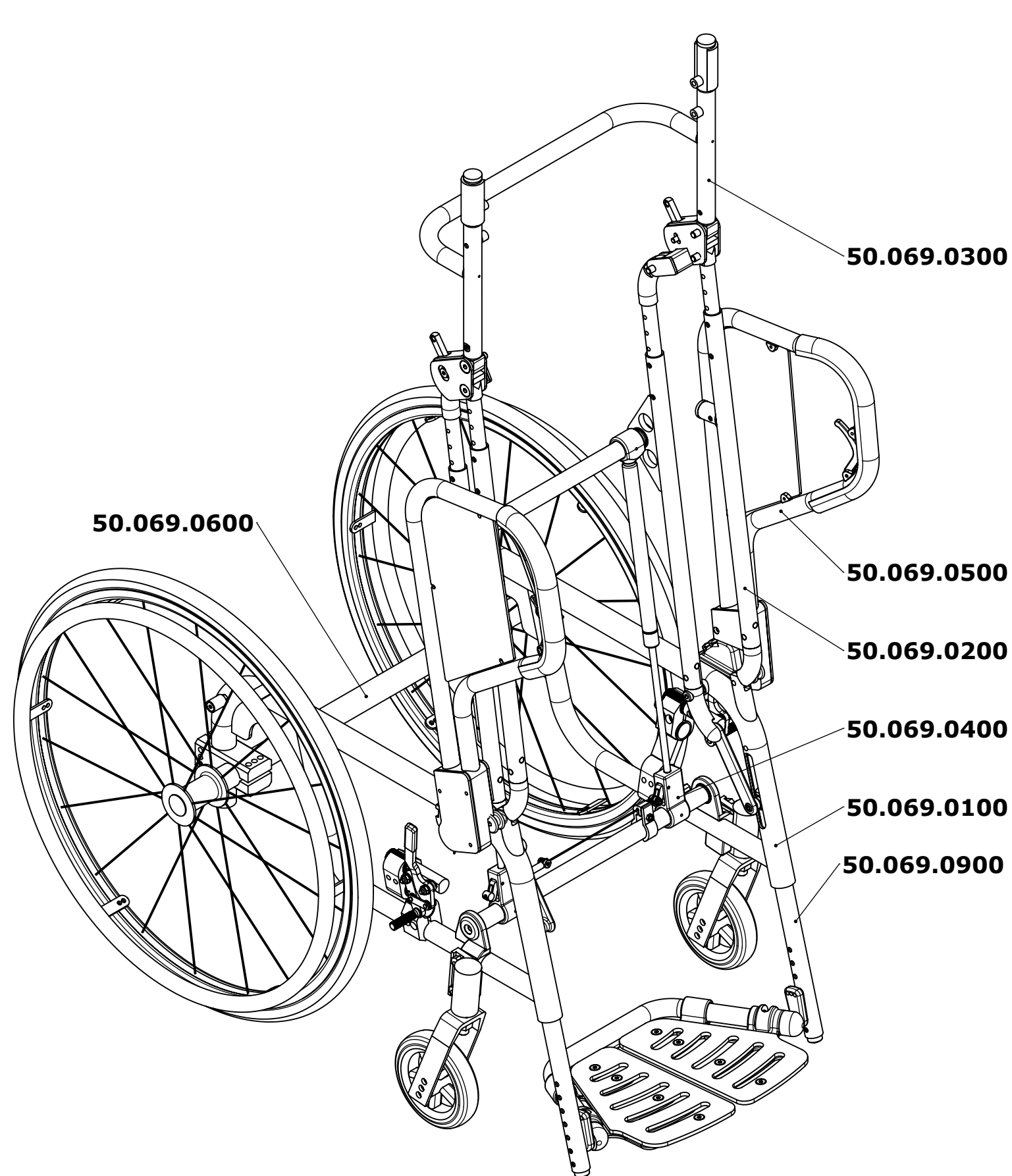


Erstellt Prepared	26.09.2007	PW	Benennung / Description	
Geändert Modified		-	LAE	
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	TN		
Status Status				
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair
			LAE	Artikelnummer Art. no.
				50.069.0000
				Blatt / Anz. Sheet / no. of
				1 / 1
				Index / Rev.

Farbe	color	rechts/right	links/left
platin	platinum	32.069.10	32.069.11
blau	blue	32.069.1010	32.069.1110
gelb	yellow	32.069.1011	32.069.1111
rot	red	32.069.1012	32.069.1112
schwarz	black	32.069.1014	32.069.1114
Reflexfarbe	reflex color	32.069.1013	32.069.1113
rot metallic	red metallic	32.069.1015	32.069.1115
blau metallic	blue metallic	32.069.1016	32.069.1116
grün metallic	green metallic	32.069.1017	32.069.1117
silber metallic	silver metallic	32.069.1018	32.069.1118
Aluminium poliert	aluminum polished	32.069.1019	32.069.1119
RAL	RAL	32.069.1020	32.069.1120

10.057.0406

31.640.31

32.069.1220

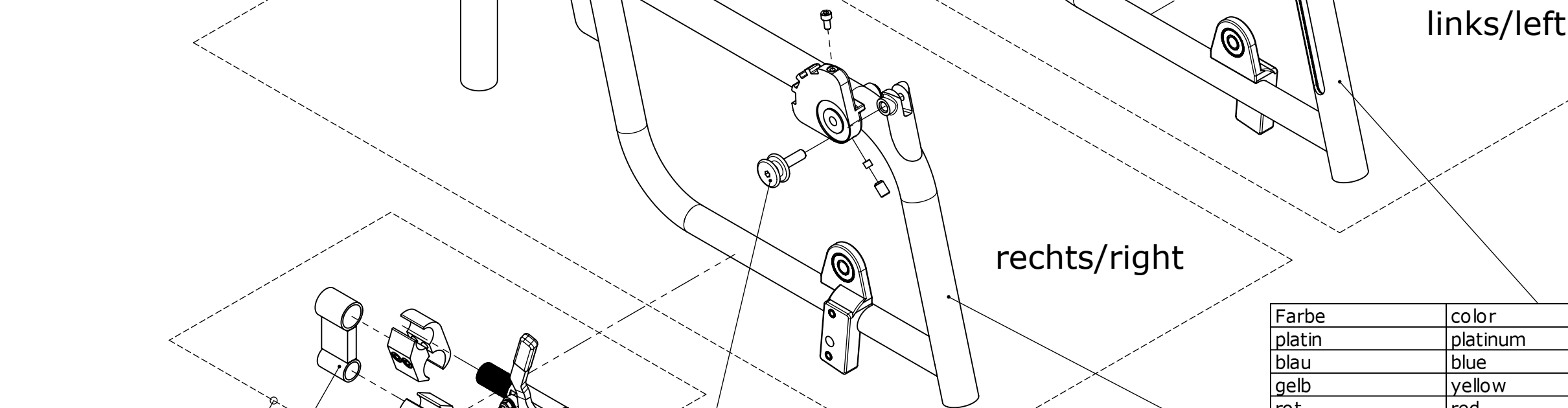


32.069.12

links/left

rechts/right

Farbe	color	rechts/right	links/left
platin	platinum	31.690.0052	31.690.0053
blau	blue	31.690.0152	31.690.0153
gelb	yellow	31.690.0252	31.690.0253
rot	red	31.690.0352	31.690.0353
schwarz	black	31.690.0552	31.690.0553
Reflexfarbe	reflex color	31.690.0452	31.690.0453
rot metallic	red metallic	31.690.0351	31.690.0350
blau metallic	blue metallic	31.690.0356	31.690.0355
grün metallic	green metallic	31.690.0358	31.690.0357
silber metallic	silver metallic	31.690.0451	31.690.0450
Aluminium poliert	aluminum polished	31.690.0456	31.690.0455
RAL	RAL	31.690.0458	31.690.0457

Erstellt Prepared	07.09.2007	PW	Benennung / Description Grundrahmen Basic frame		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	TN			
Status Status					
LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair LAE	Artikelnummer Art. no. 50.069.0100	

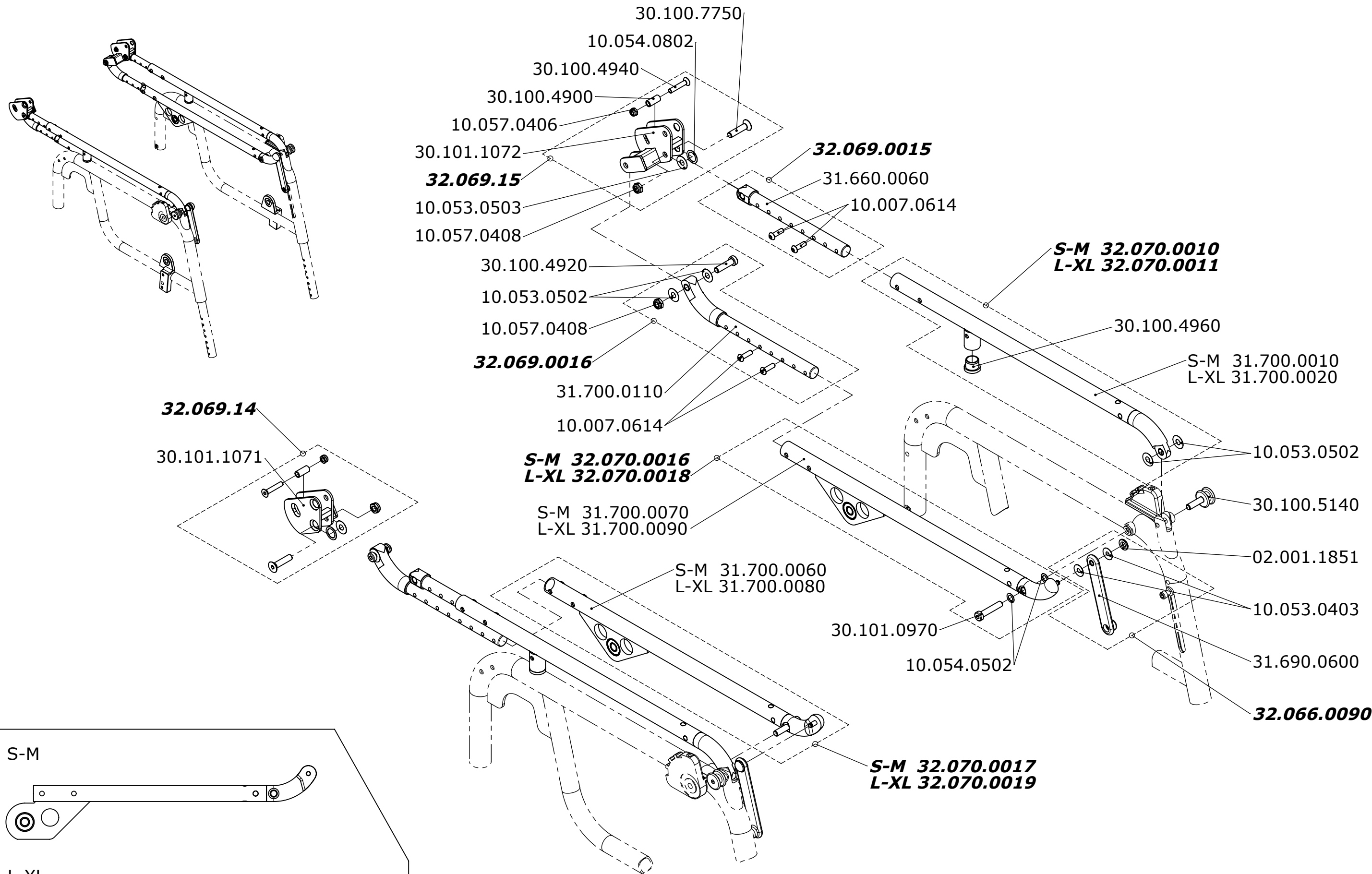


S-M


L-XL

Erstellt Prepared	12.09.2007	PW	Benennung / Description Sitzträger Seat support	Artikelnummer Art. no. 50.069.0200	Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev. A
Geändert Modified	10.03.2010	PW			
Gepr./Freig. Approved	10.03.2010	TN			
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair LAE	

Sitzbreite Seat width	
35	30.101.6090
38	30.100.7620
40	30.100.7580
42	30.100.7650
45	30.100.7600
48	30.102.3100

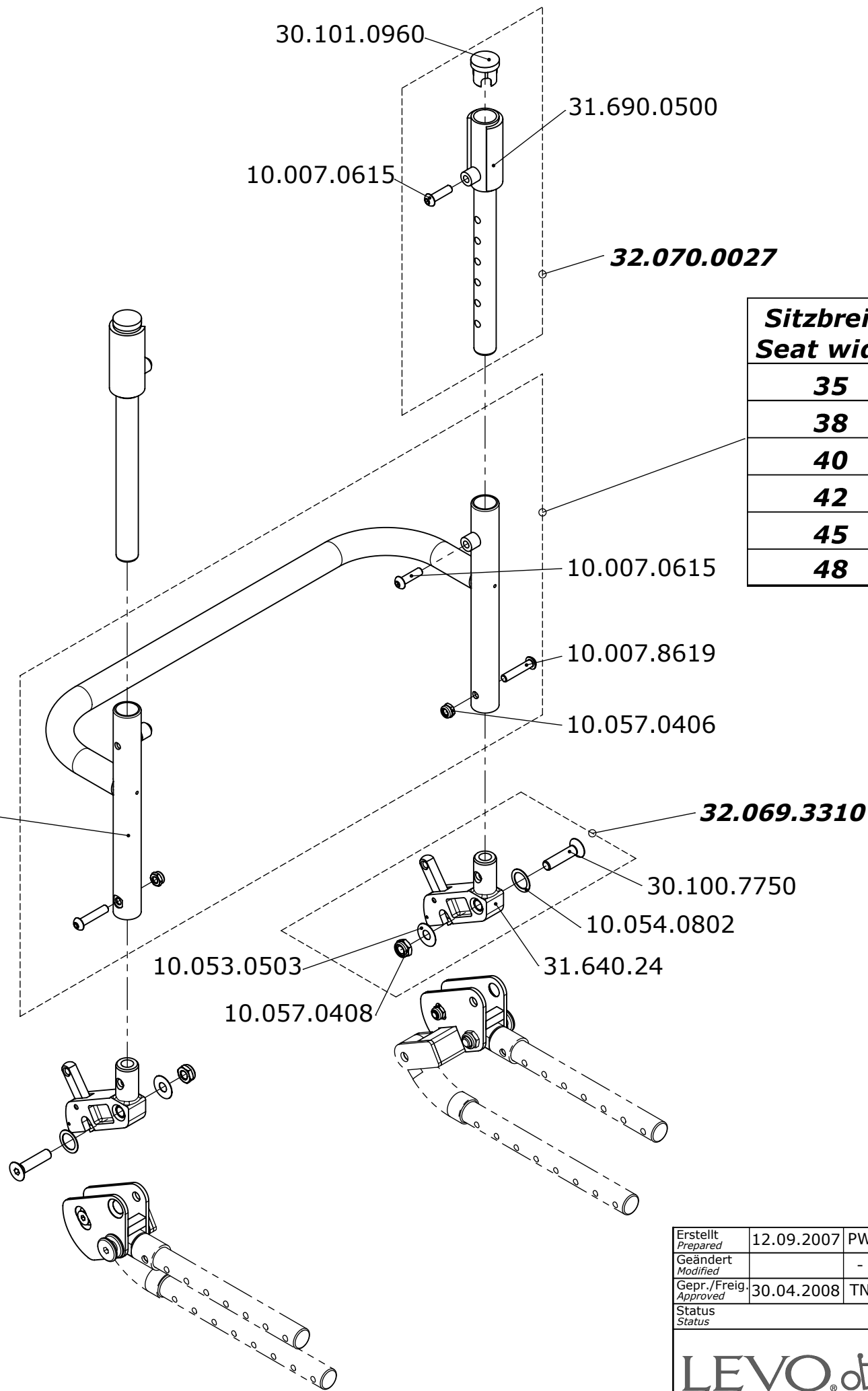

Sitzbreite Seat width	
35	32.069.2890
38	32.069.2910
40	32.069.3010
42	32.069.3110
45	32.069.3210
48	32.069.3220

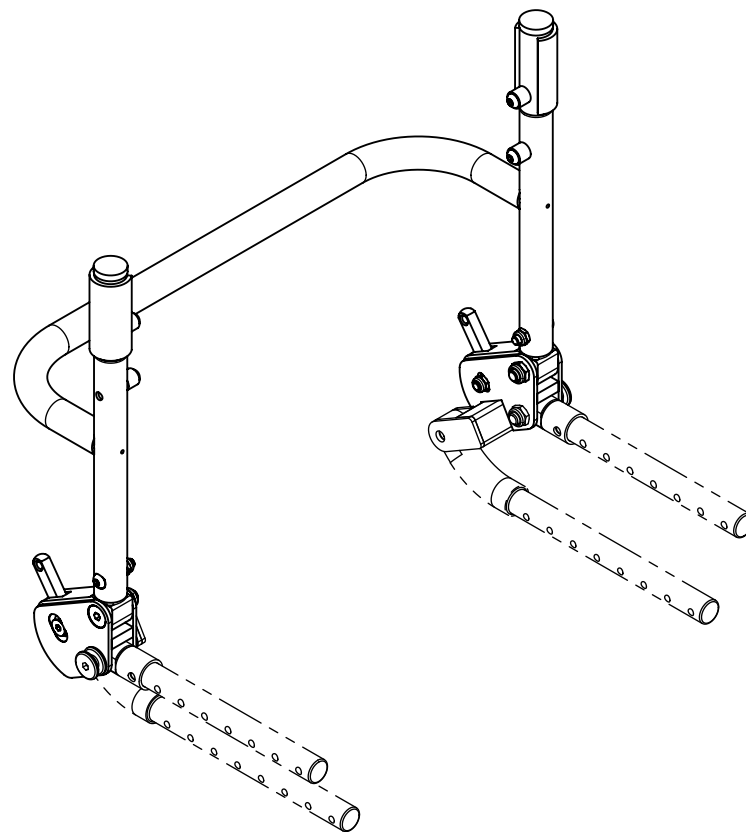



Erstellt Prepared	12.09.2007	PW	Benennung / Description	
Geändert Modified		-	Rücken Backrest	
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	TN		
Status				
LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair	Artikelnummer Art. no.
LAE				50.069.0300
				Blatt / Anz. Sheet / no. of
				1 / 1
				Index / Rev.

Sitzbreite Seat width	
35	32.069.4090
38	32.069.41
40	32.069.42
42	32.069.43
45	32.069.44
48	32.069.4410


Sitzbreite Seat width	
35	30.101.6010
38	30.100.4470
40	30.100.4480
42	30.100.4490
45	30.100.4500
48	30.102.4940

Sitzbreite Seat width	
35	32.069.4590
38	32.069.46
40	32.069.47
42	32.069.48
45	32.069.49
48	32.069.4910

Sitzbreite Seat width	
35	30.101.6050
38	30.100.4360
40	30.100.4370
42	30.100.4380
45	30.100.4390
48	30.102.4700

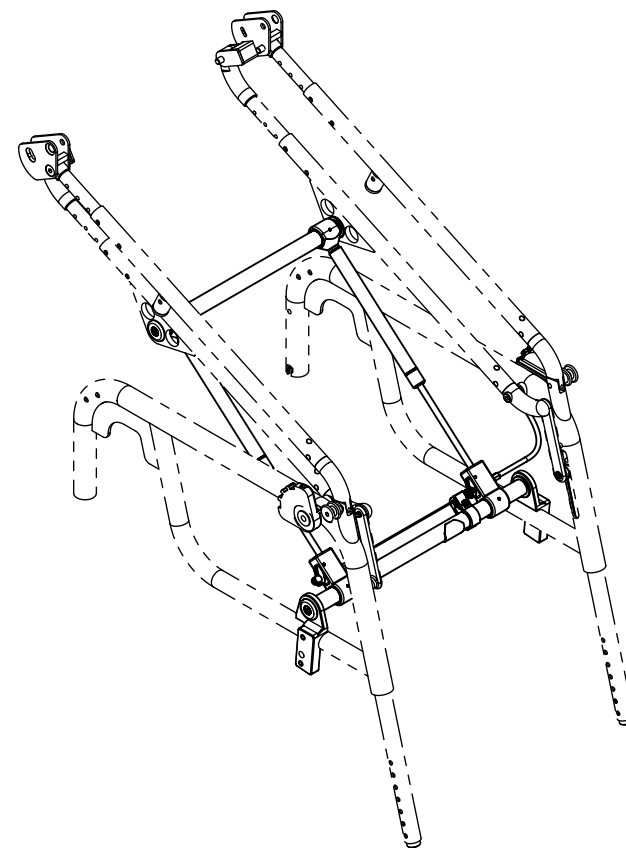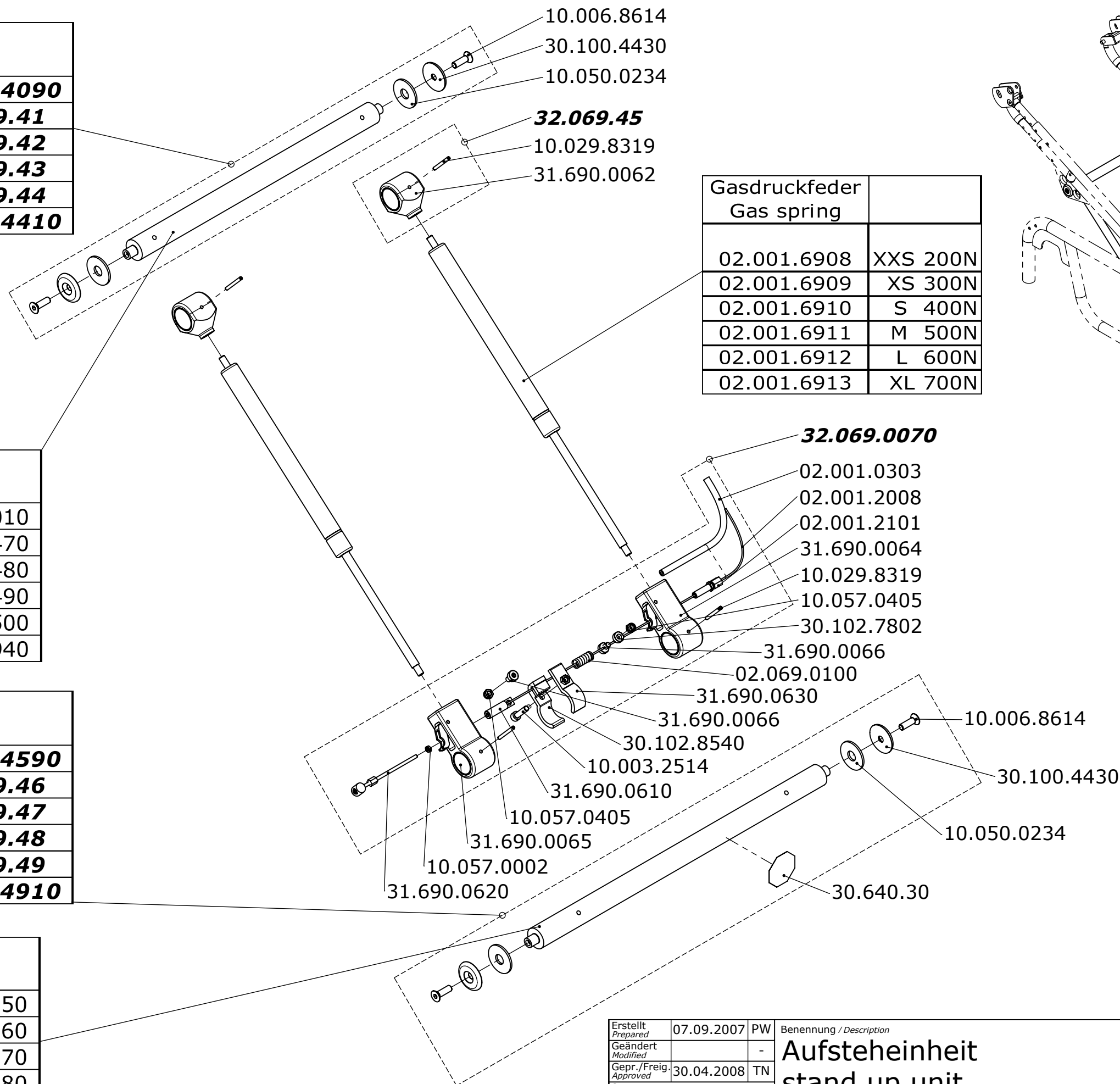


Erstellt Prepared	07.09.2007	PW	Benennung / Description	
Geändert Modified		-	Aufsteheinheit stand up unit	
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	TN		
Status Status				
LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair	Artikelnnummer Art. no.
LAE				50.069.0400
				Blatt / Anz. Sheet / no. of
				1 / 1
				Index / Rev.

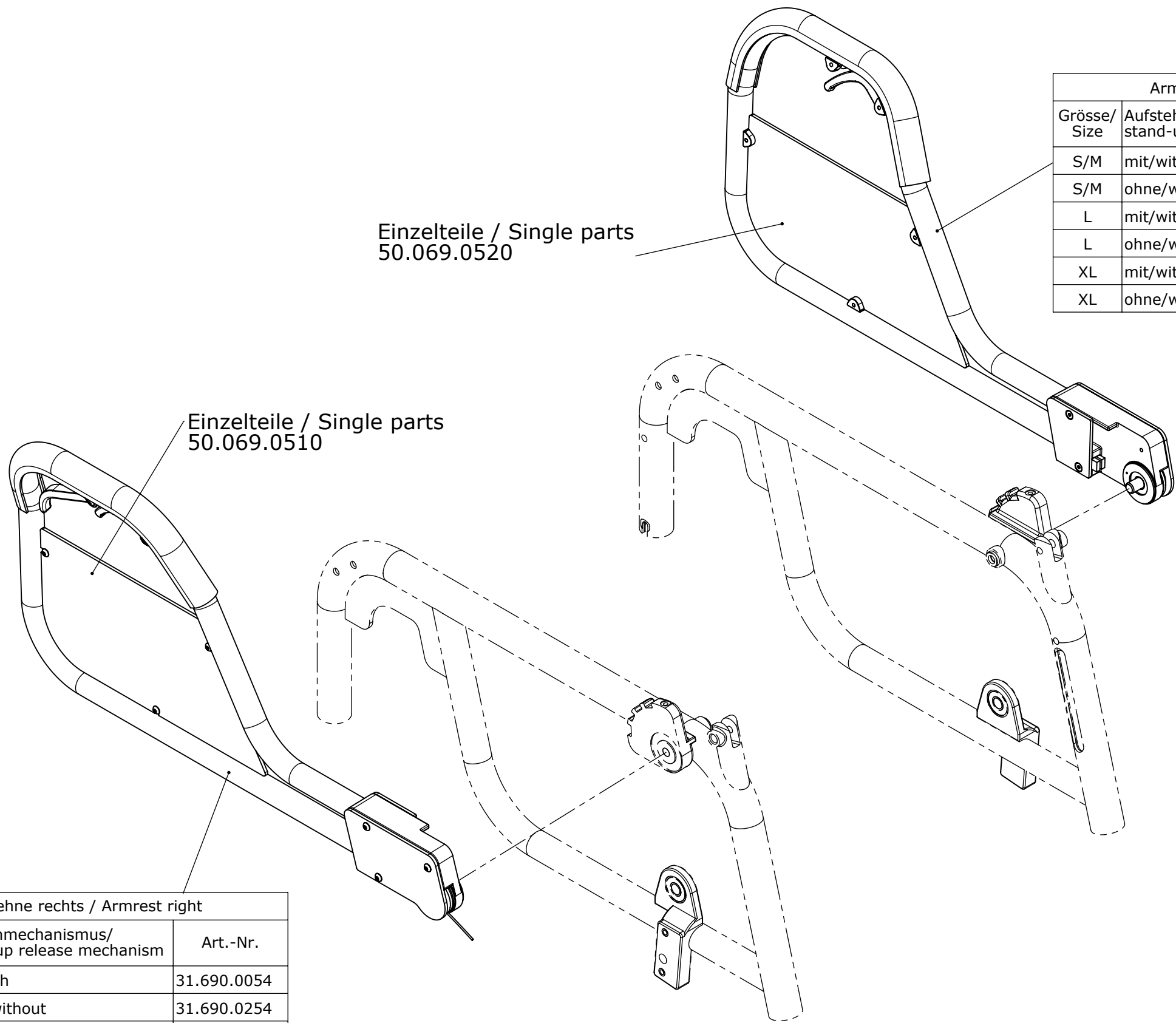

Armlehne links / Armrest left		
Grösse/ Size	Aufstehmechanismus/ stand-up release mechanism	Art.-Nr.
S/M	mit/with	31.690.0055
S/M	ohne/without	31.690.0255
L	mit/with	31.690.0057
L	ohne/without	31.690.0257
XL	mit/with	31.690.0059
XL	ohne/without	31.690.0259


Armlehne rechts / Armrest right		
Grösse/ Size	Aufstehmechanismus/ stand-up release mechanism	Art.-Nr.
S/M	mit/with	31.690.0054
S/M	ohne/without	31.690.0254
L	mit/with	31.690.0056
L	ohne/without	31.690.0256
XL	mit/with	31.690.0058
XL	ohne/without	31.690.0258

Erstellt <i>Prepared</i>	06.09.2007	PW	Benennung / Description Armlehnen Armrest		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.		
Geändert <i>Modified</i>		-					
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN					
Status <i>Status</i>							
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch				
			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.0500			

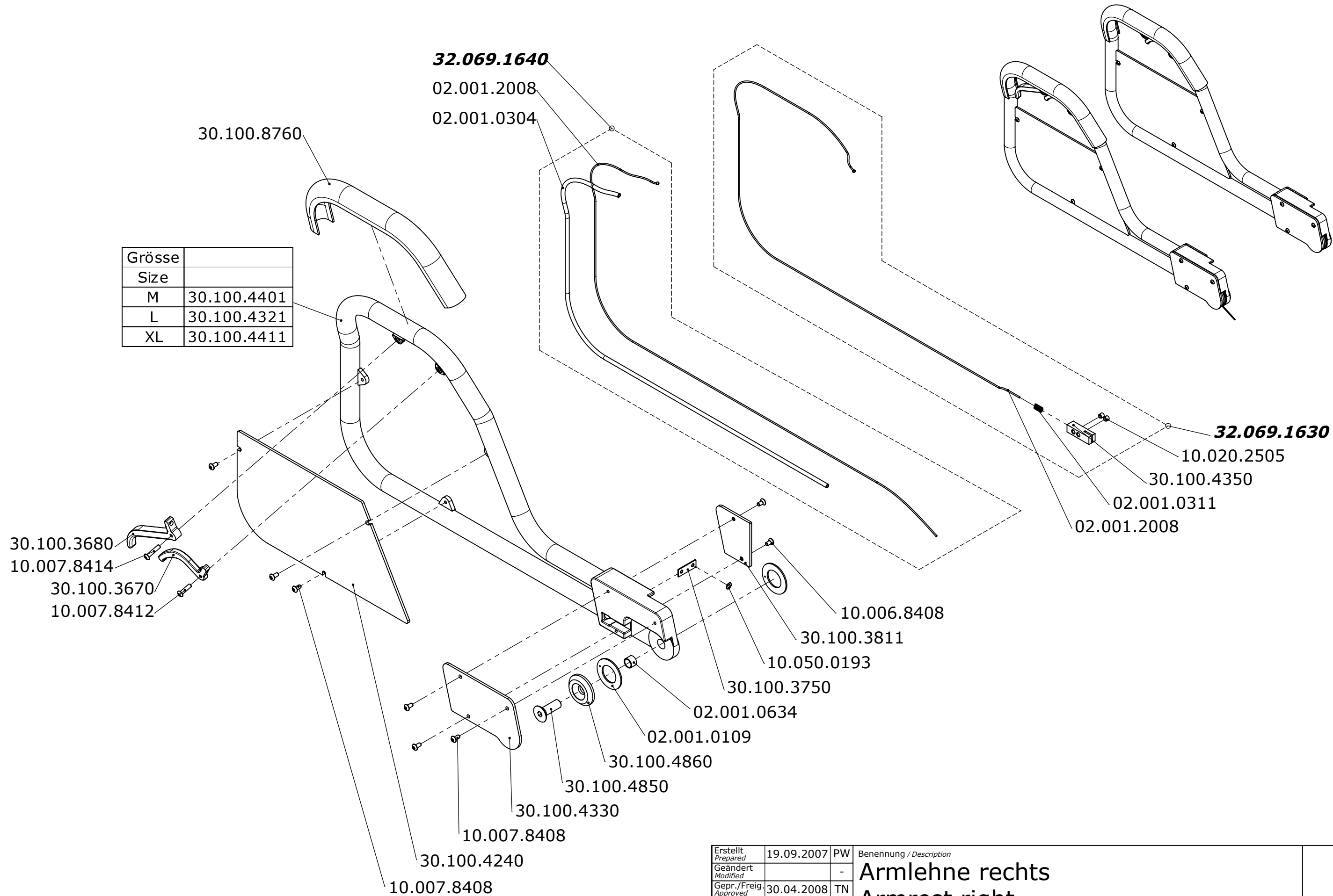


Grösse	
Size	
M	30.100.4401
L	30.100.4321
XL	30.100.4411

Erstellt Prepared	19.09.2007	PW	Benennung / Description Armlehne rechts Armrest right		
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	TN			
Status Status					
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair	Artikelnummer Art. no.	Blatt / Anz Sheet / no. of
			LAE	50.069.0510	1 / 1 Index / Rev.

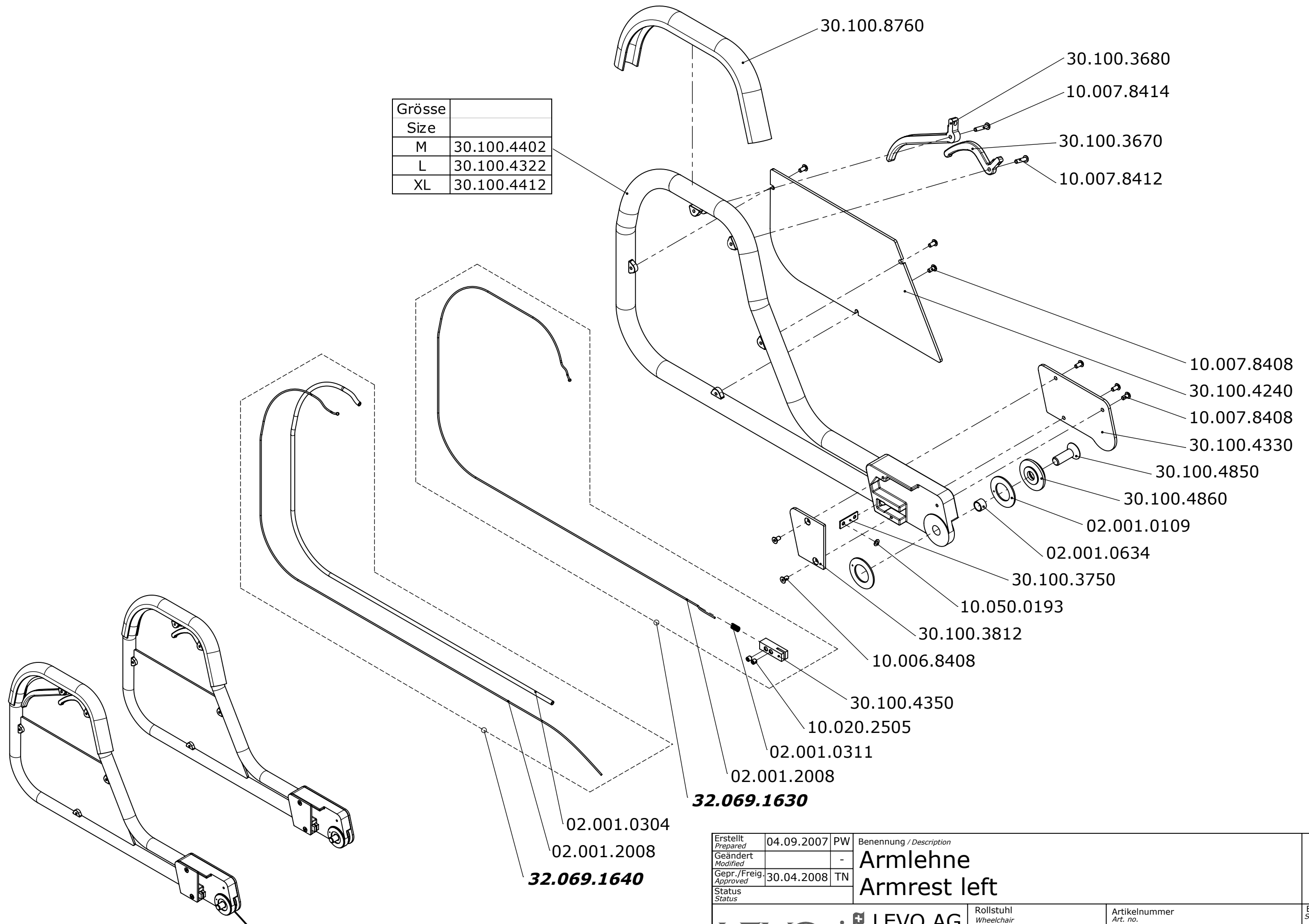


Erstellt <i>Prepared</i>	04.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Armlehne Armrest left		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
LEVO[®]  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i>
			LAE	50.069.0520	1 / 1 <i>Index / Rev.</i>


S

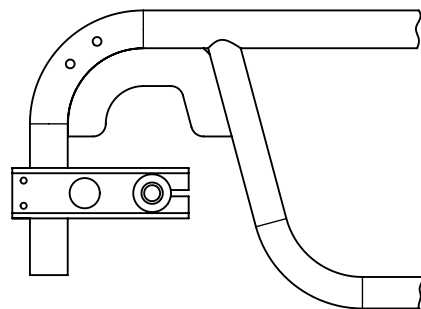


M

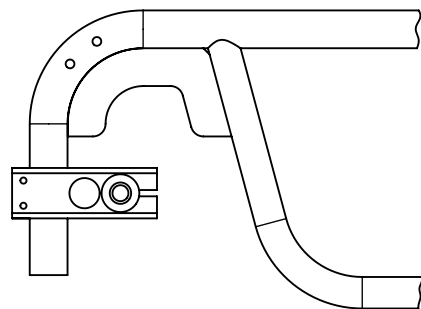

L

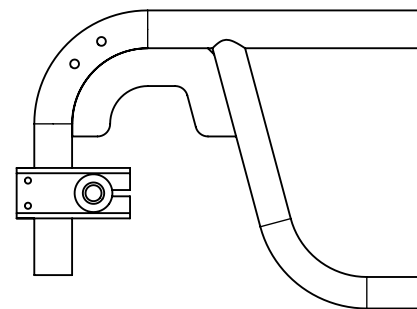

XL

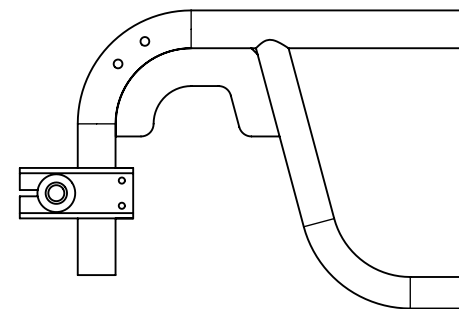

Grösse Size	
S	30.100.5380
M	30.100.5400
L/XL	30.100.5360

02.001.1710

10.020.2614

10.050.0046

10.016.2624

Standard

3°


6°

Sitzbreite Seat width	Standard	Radsturz 3° Camber 3°	Radsturz 6° Camber 6°
35	31.690.0100	31.700.0390	31.700.0460
38	31.700.0320	31.700.0400	31.700.0470
40	31.700.0330	31.700.0410	31.700.0480
42	31.690.0110	31.690.0130	31.690.0150
45	31.690.0120	31.700.0430	31.700.0500
48	31.700.0360	31.690.0140	31.690.0160

Grösse Size	
S	32.064.0130
M	32.064.0131
L/XL	32.064.0132


Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	TN	Benennung / <i>Description</i> Hinterradachse Rear wheel axle		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i>
			LAE	50.069.0600	1 / 1
					Index / <i>Rev.</i>

Standard

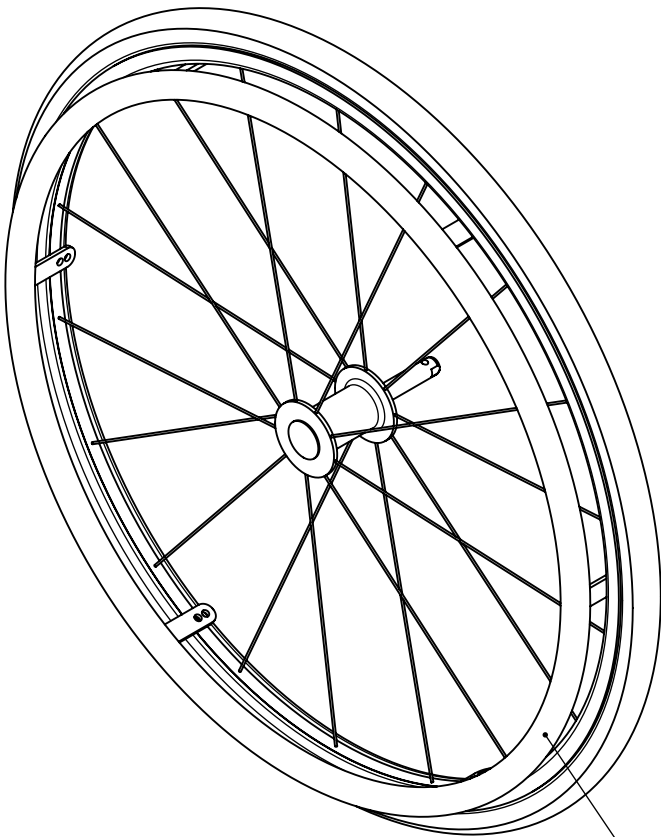


50.070.0710

Spinergy

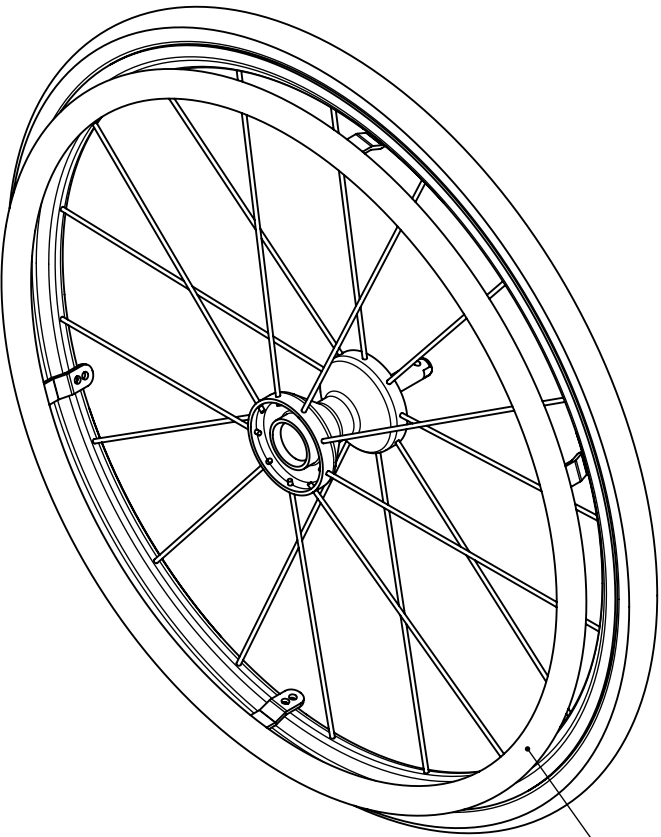


50.070.0720

mit Naben-Feststellbremse
with hub locking brake

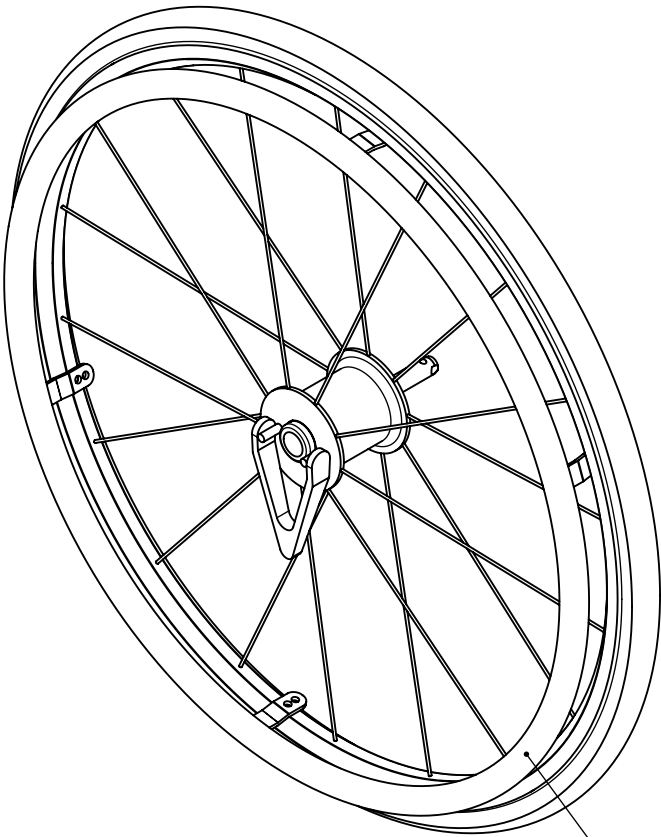

50.070.0730

Luftpumpe
Air pump

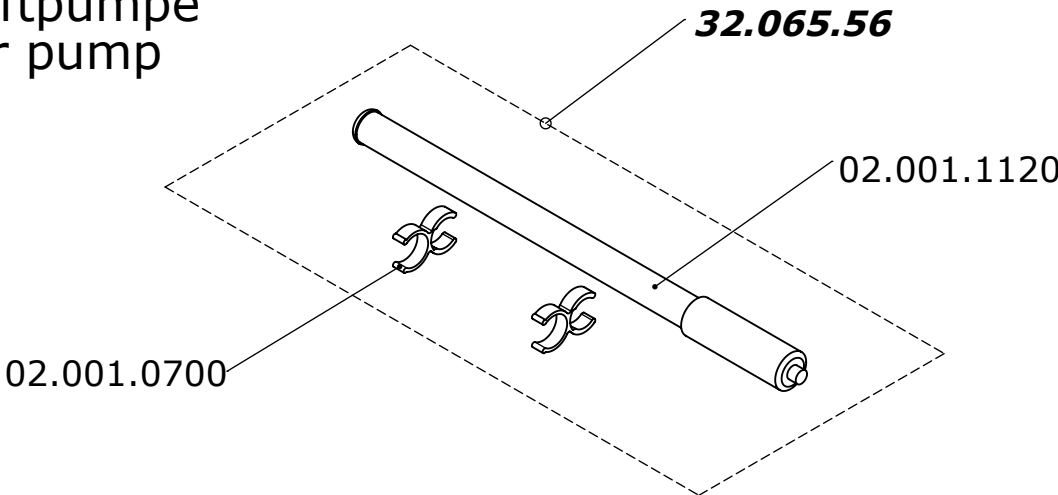

32.065.56


02.001.1120

02.001.0700

Erstellt <i>Prepared</i>	11.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Hinterräder Rear wheels			
Geändert <i>Modified</i>		-				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN				
Status <i>Status</i>						
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i>	
			LAE	50.069.0700	1 / 1	
					Index / <i>Rev.</i>	

02.400.1000

02.400.5002

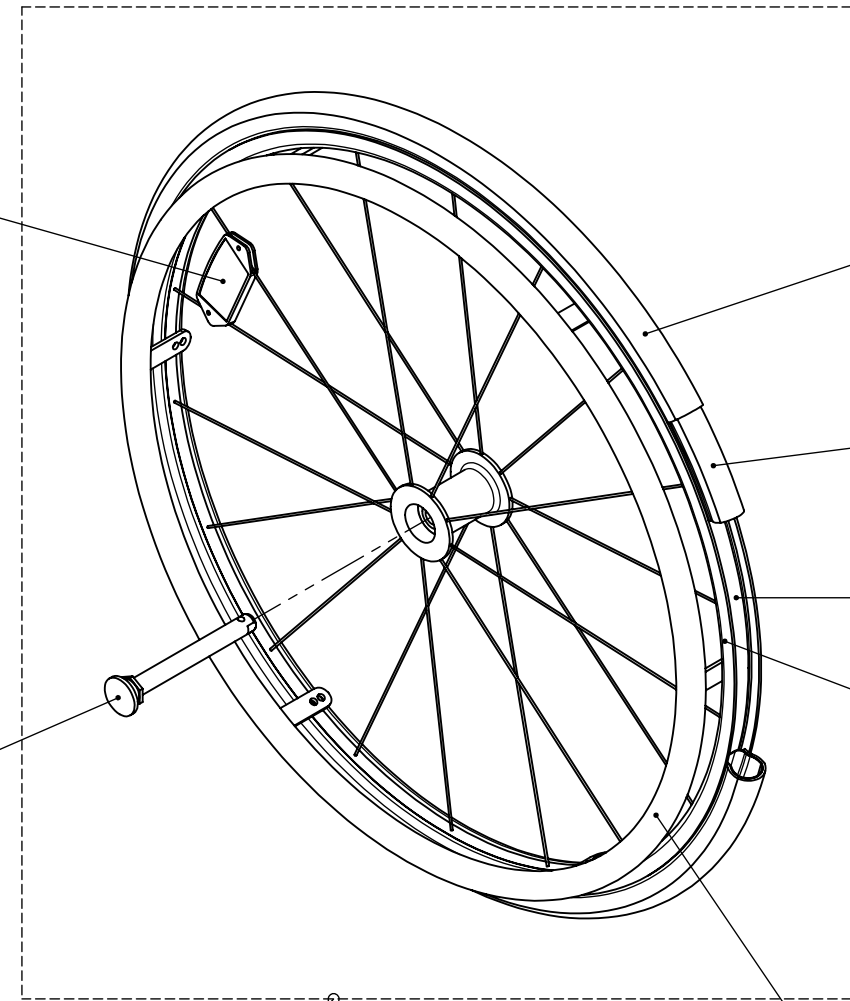

	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	02.400.2212	02.400.2322
24"	02.400.2425	02.400.2324
26"	02.400.2627	02.400.2326

22"	02.400.2215
24"	02.400.2426
26"	02.400.2628

22"	02.400.2216
24"	02.400.2427
26"	02.400.2630


22"	02.400.2213
24"	02.400.2423
26"	02.400.2623

22"	02.400.2200
24"	02.400.2400
26"	02.400.2600

	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	32.070.0200	32.070.0230
24"	32.070.0210	32.070.0240
26"	32.070.0220	32.070.0250

	Standard	Optionen / Options		
	Aluminium Aluminum	Stahl Steel	Maxgrepp Original	Maxgrepp Ergo Para CP
22"	02.400.2223	02.402.2202	02.069.0051	02.069.0041
24"	02.400.2424	02.402.2402	02.069.0050	02.069.0040
26"	02.400.2629	02.402.2602	02.069.0052	02.069.0042


02.069.1015

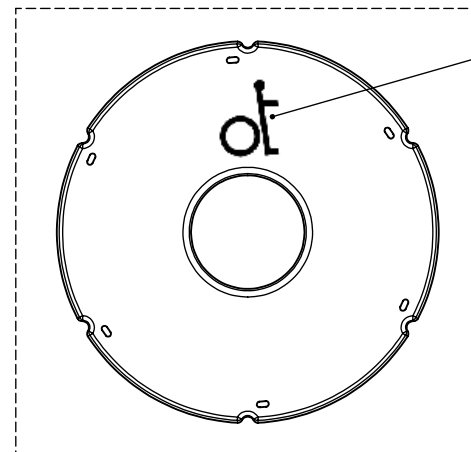

	transparent	mit LEVO-Logo with LEVO-Logo
22"	02.066.1014	32.069.0062
24"	02.066.1015	32.069.0063
26"	02.066.1017	32.069.0064

Erstellt <i>Prepared</i>	11.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Standard Rad Standard wheel		
Geändert <i>Modified</i>	23.06.2010	PW			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	23.06.2010	TN			
Status freigegeben/approved <i>Status</i>					
LEVO[®]  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.0710	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> C

02.400.4900

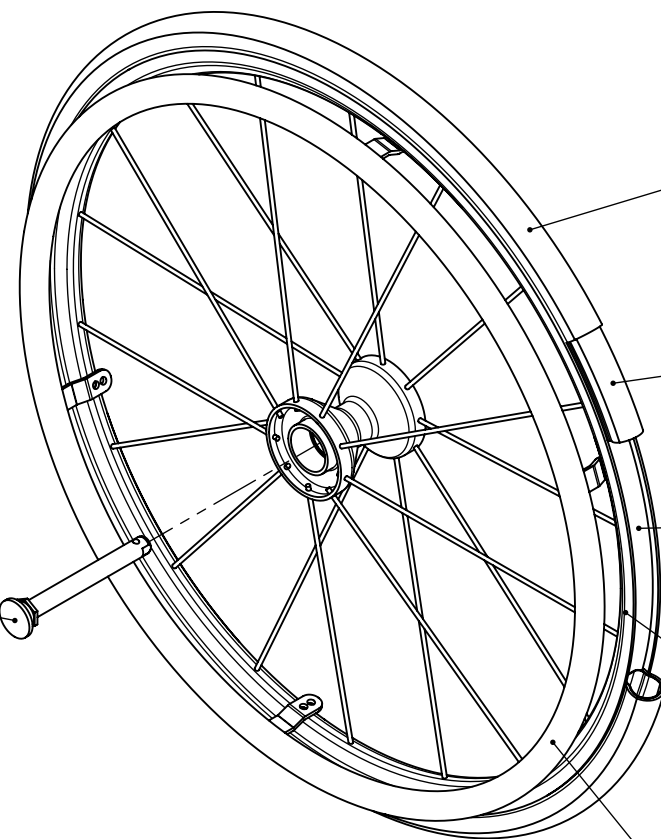

	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	02.400.2212	02.400.2322
24"	02.400.2425	02.400.2324
26"	02.400.2627	02.400.2326

22"	02.400.2215
24"	02.400.2426
26"	02.400.2628

22"	02.400.2216
24"	02.400.2427
26"	02.400.2630

22"	schwarz	02.403.2201
	rot	02.403.2203
	weiss	02.403.2205
24"	schwarz	02.403.2401
	rot	02.403.2403
	weiss	02.403.2405
26"	schwarz	02.403.2601
	rot	02.403.2603
	weiss	02.403.2605


		luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	schwarz	32.070.0261	32.070.0291
	rot	32.070.0262	32.070.0292
	weiss	32.070.0263	32.070.0293
24"	schwarz	32.070.0271	32.070.0301
	rot	32.070.0272	32.070.0302
	weiss	32.070.0273	32.070.0303
26"	schwarz	32.070.0281	32.070.0311
	rot	32.070.0282	32.070.0312
	weiss	32.070.0283	32.070.0313

	Standard	Optionen / Options		
	Aluminium Aluminum	Stahl Steel	Maxgrepp Original	Maxgrepp Ergo Para CP
22"	02.400.2223	02.402.2202	02.069.0051	02.069.0041
24"	02.400.2424	02.402.2402	02.069.0050	02.069.0040
26"	02.400.2629	02.402.2602	02.069.0052	02.069.0042

Erstellt <i>Prepared</i>	11.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Spinergy Rad Spinergy wheel			
Geändert <i>Modified</i>		-				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN				
Status <i>Status</i>						
 THE EXPERTS IN STANDING			 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / An <i>Sheet / no.</i>
				LAE	50.070.0720	1 / 1 <i>Index / Re</i>

02.400.1000

02.001.1322

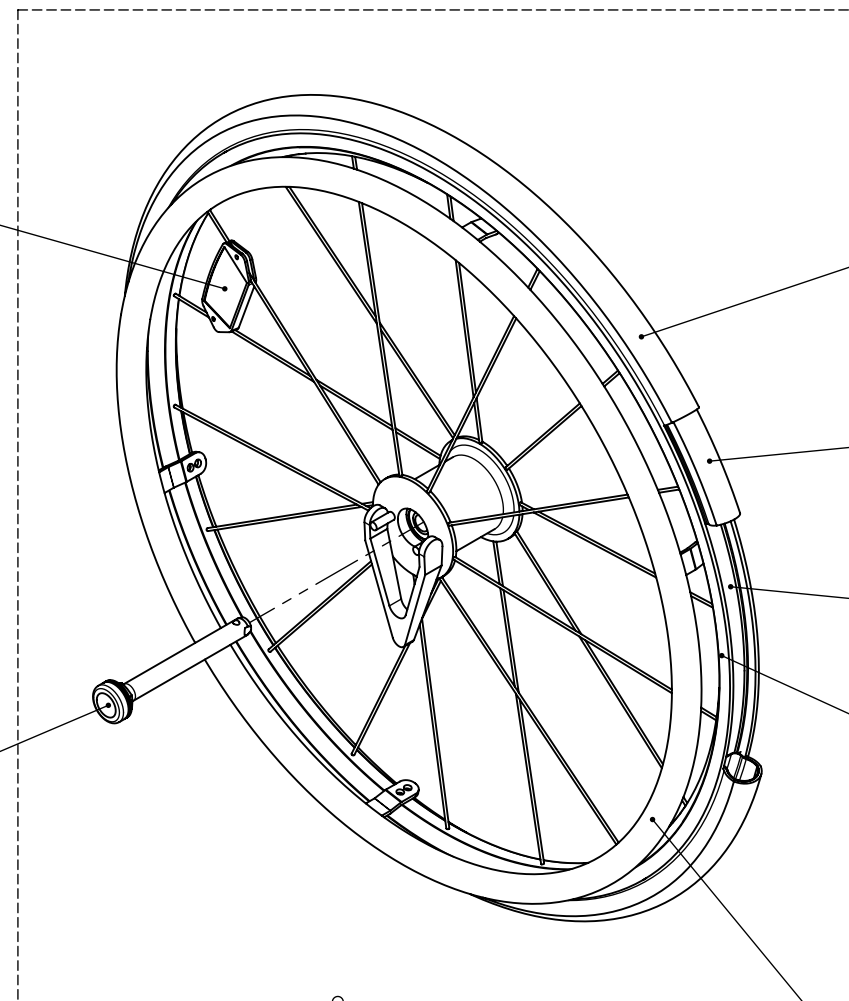

	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	02.400.2212	02.400.2322
24"	02.400.2425	02.400.2324
26"	02.400.2627	02.400.2326

22"	02.400.2215
24"	02.400.2426
26"	02.400.2628


22"	02.400.2216
24"	02.400.2427
26"	02.400.2630

22"	02.001.1319
24"	02.001.1320
26"	02.001.1321

	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	32.070.0320	32.070.0350
24"	32.070.0330	32.070.0360
26"	32.070.0340	32.070.0370


	Standard	Optionen / Options		
	Aluminium Aluminum	Stahl Steel	Maxgrepp Original	Maxgrepp Ergo Para CP
22"	02.400.2223	02.402.2202	02.069.0051	02.069.0041
24"	02.400.2424	02.402.2402	02.069.0050	02.069.0040
26"	02.400.2629	02.402.2602	02.069.0052	02.069.0042

02.069.1015




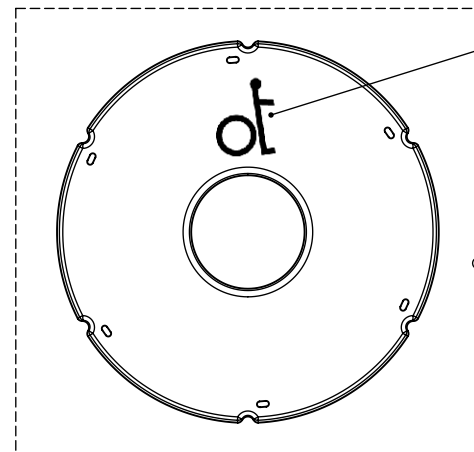


	transparent	mit LEVO-Logo with LEVO-Logo
22"	02.066.1014	32.069.0062
24"	02.066.1015	32.069.0063
26"	02.066.1017	32.069.0064

Erstellt <i>Prepared</i>	11.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Rad zu Nabenfeststellbremse Wheel to hub locking brake			
Geändert <i>Modified</i>	27.11.2009	PW				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	27.11.2009	TN				
Status <i>Status</i>						
LEVO[®]  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.0730	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> A	

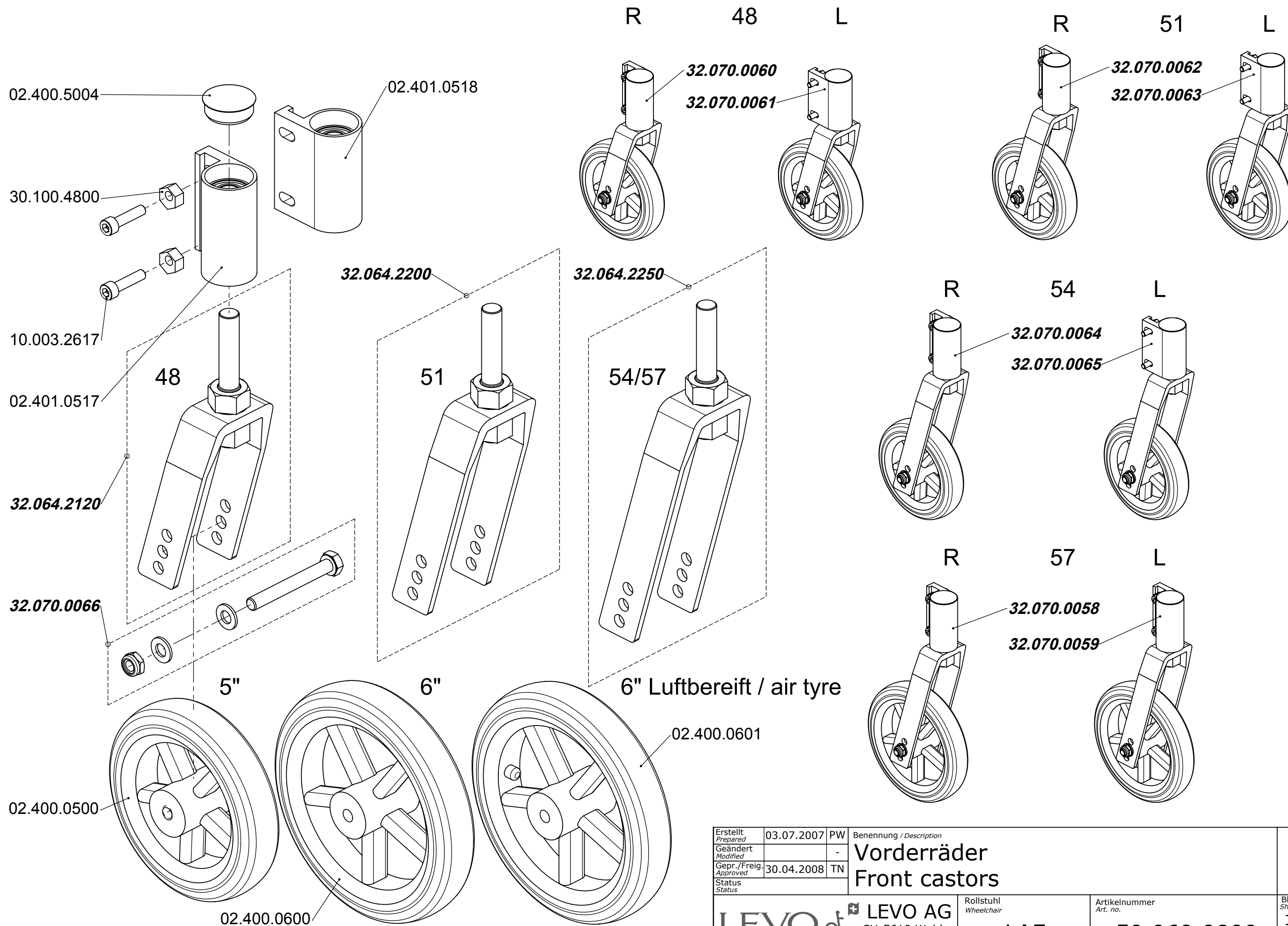

Erstellt Prepared	03.07.2007	PW	Benennung / Description		
Geändert Modified		-	Vorderräder Front castors		
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	TN			
Status					
LEVO AG		Rollstuhl Wheelchair	Artikelnummer Art. no.	Blatt / Anz. Sheet / no. of	
CH-5610 Wohlen		LAE	50.069.0800	1 / 1	
www.levo.ch				Index / Rev.	

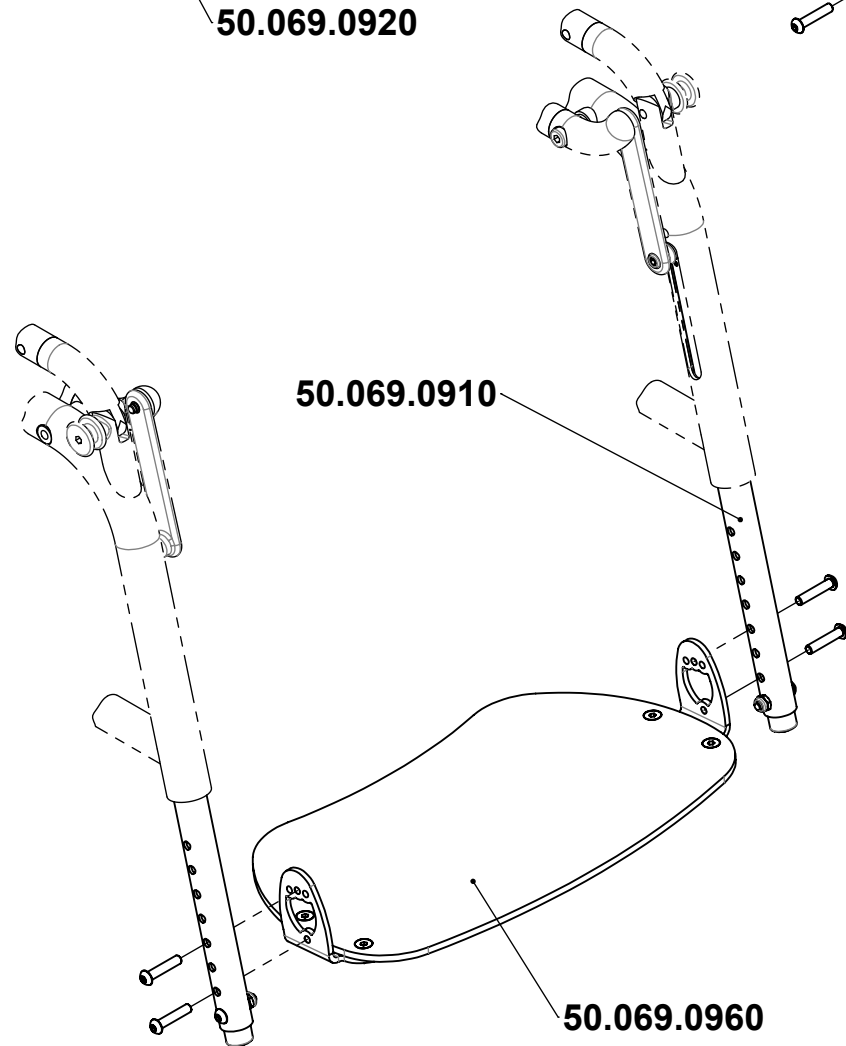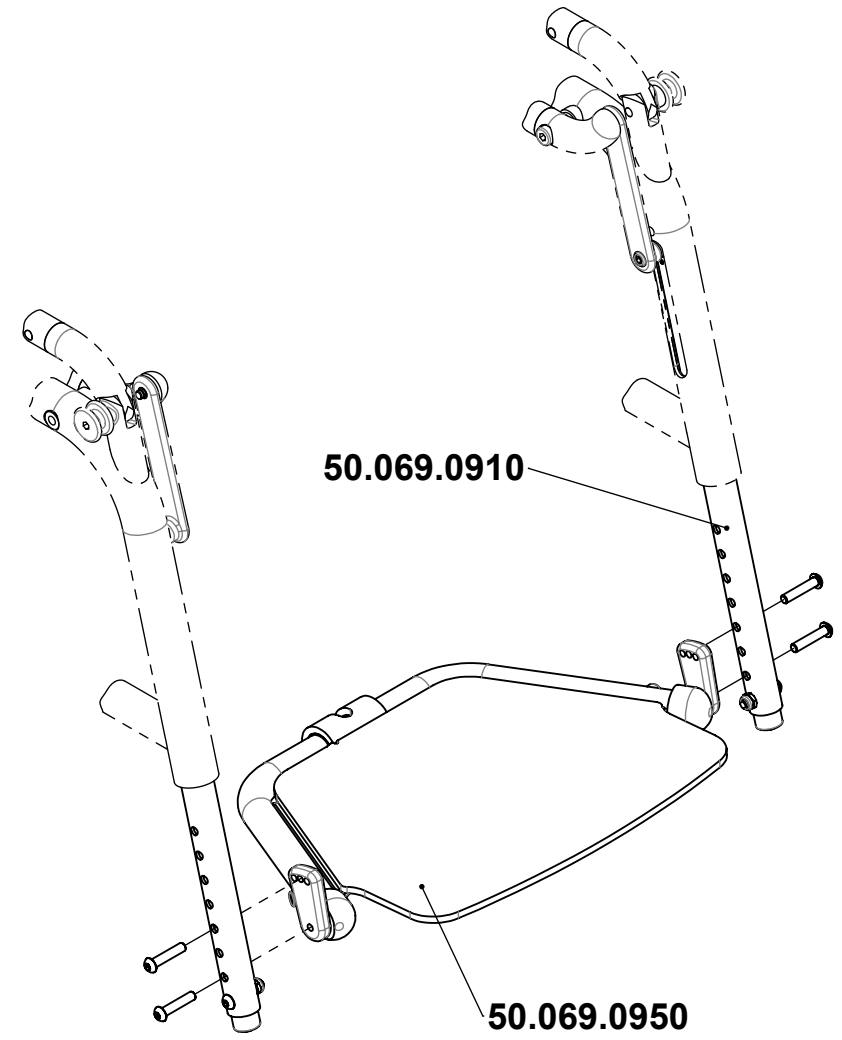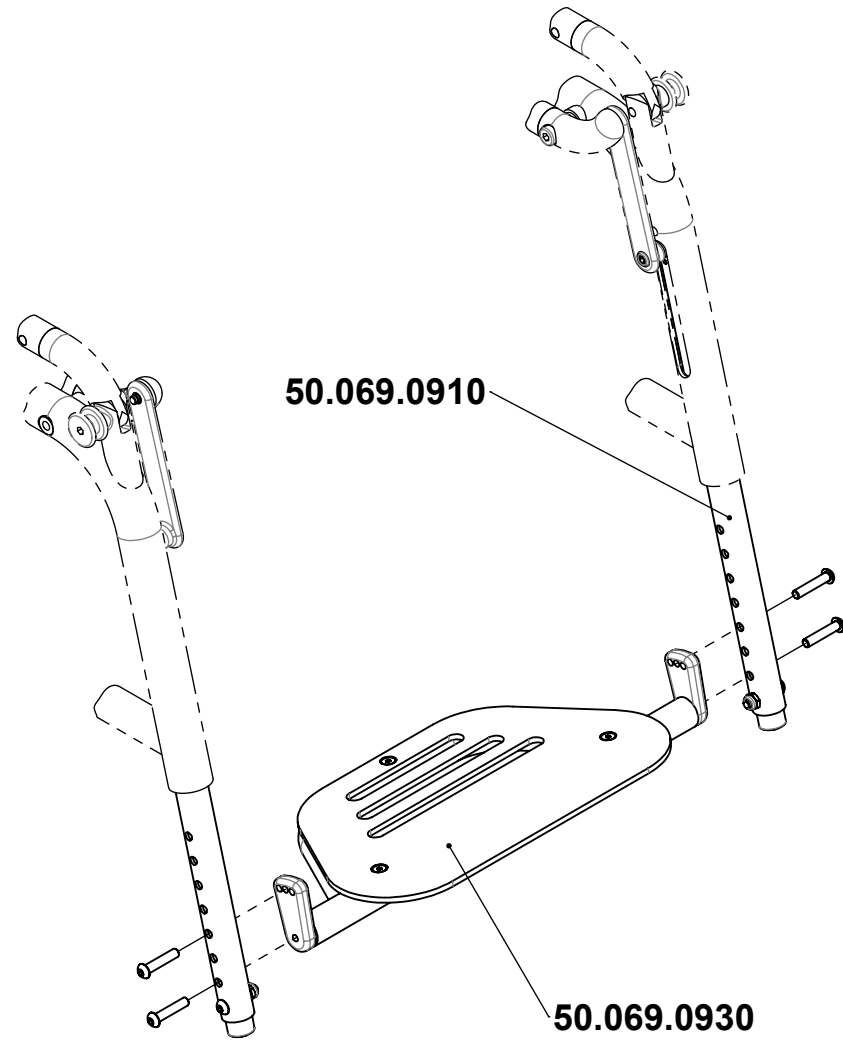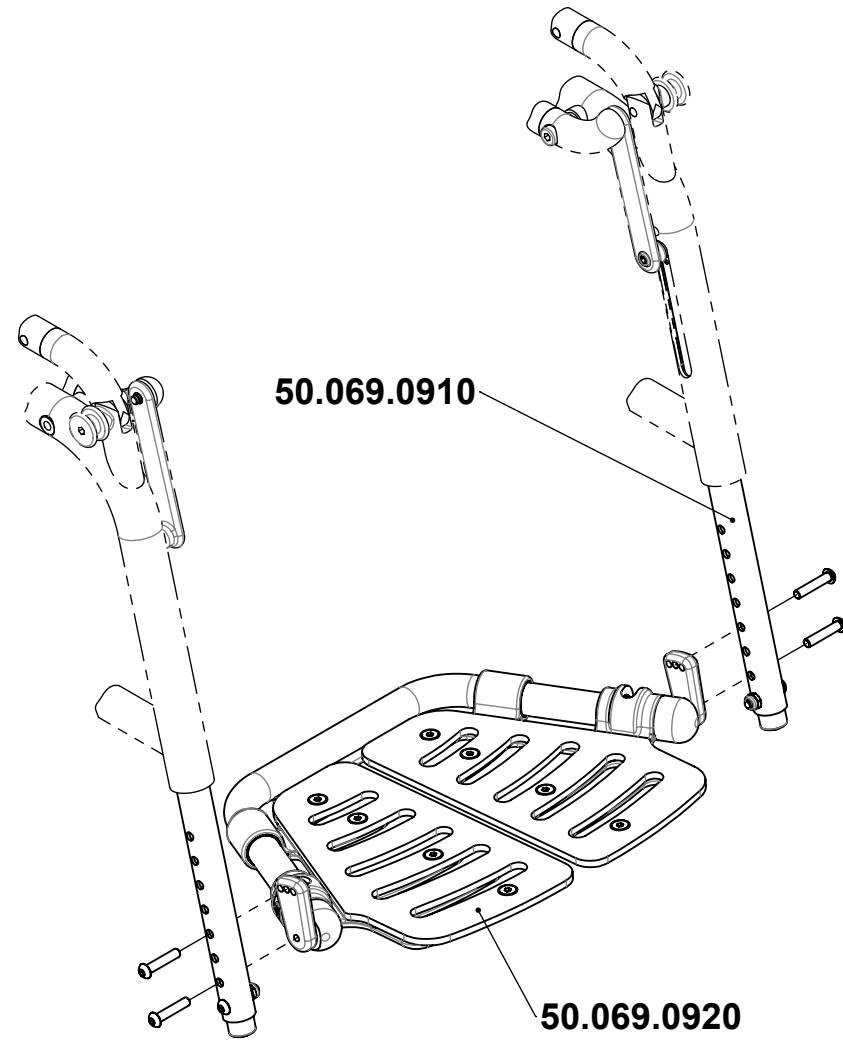


Erstellt <i>Prepared</i>	10.09.2007	PW
Geändert <i>Modified</i>	27.06.2013	PW
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	27.06.2013	BM
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved	

LEVO ⁺
THE EXPERTS IN STANDING



LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch

Benennung / Description			
Beinstützen und Fussauflagen Legrests and Footrests			
EVO AG -5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair LAE	Artikelnummer Art. no. 50.069.0900	Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev. B

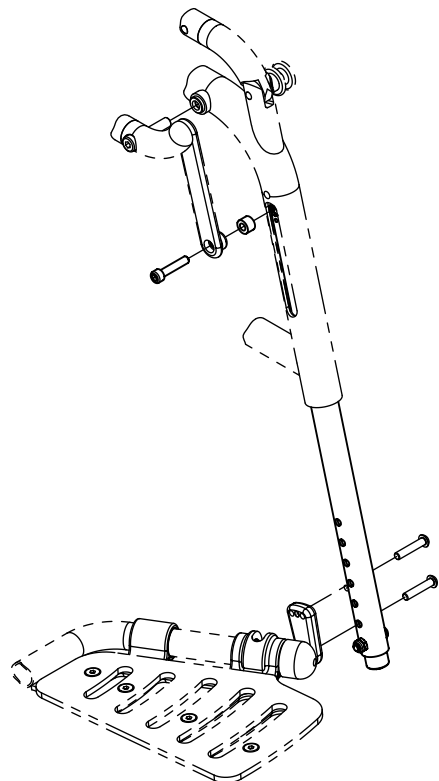


Sitzhöhe Seat height	
48	32.069.33
51	32.069.34
54	32.069.35
57	32.069.36

Sitzhöhe Seat height	
48	30.100.7110
51	30.100.7560
54	30.100.6650
57	30.100.7170

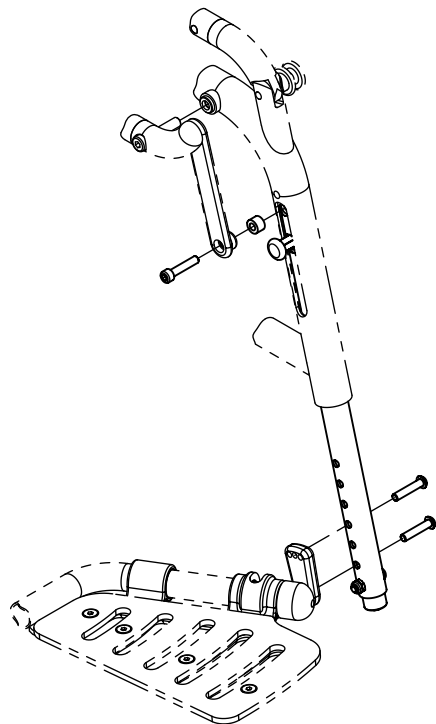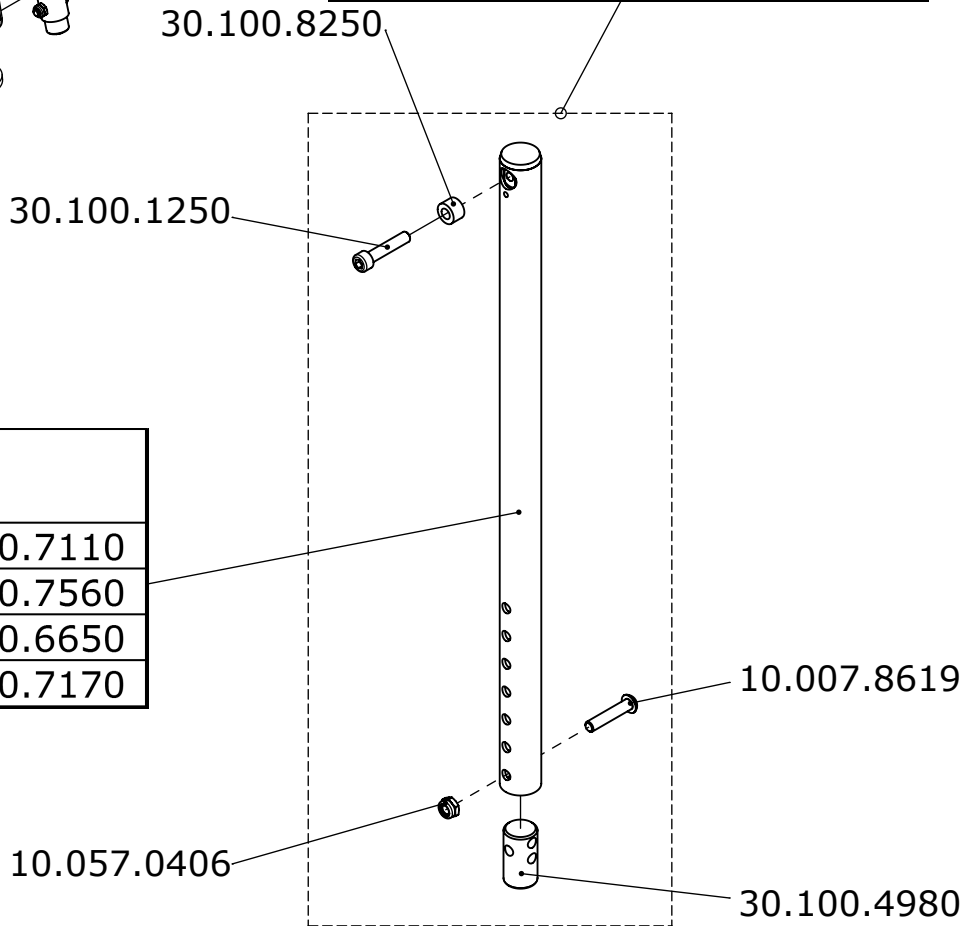

Sitzhöhe Seat height	
48	32.069.51
51	32.069.52
54	32.069.53
57	32.069.54

Sitzhöhe Seat height	
48	30.100.3560
51	30.100.2430
54	30.100.3580
57	30.100.3590

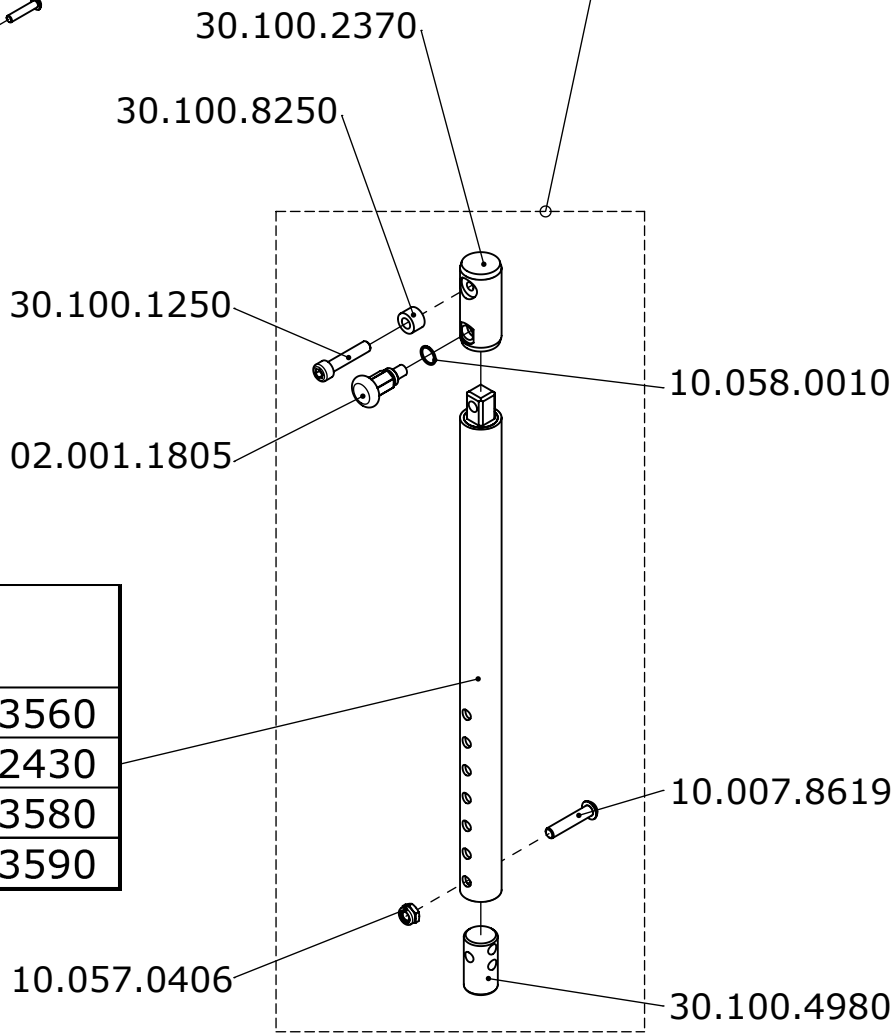

Erstellt <i>Prepared</i>	10.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Beinstützen Legrests			
Geändert <i>Modified</i>		-				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN				
Status <i>Status</i>						
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1	
			LAE	50.069.0910	Index / <i>Rev.</i>	

Sitzbreite Seat width	
35	30.102.9831
38	30.102.9832
40	30.102.9833
42	30.102.9834
45	30.102.9835
48	30.102.9836

Sitzbreite Seat width	
35	30.102.9511
38	30.102.9512
40	30.102.9513
42	30.102.9514
45	30.102.9515
48	30.102.9516

Sitzbreite Seat width	
35	30.102.9521
38	30.102.9522
40	30.102.9523
42	30.102.9524
45	30.102.9525
48	30.102.9526

Sitzbreite Seat width	
35	31.690.0711
38-50	31.690.0712


Sitzbreite Seat width	
35	31.690.0701
38-50	31.690.0702

Sitzbreite Seat width		Standard	mit Antirutschband with non-slip straps
35	31.700.0600	32.070.0171	32.070.0181
38	31.700.0610	32.070.0172	32.070.0182
40	31.700.0620	32.070.0173	32.070.0183
42	31.700.0630	32.070.0174	32.070.0184
45	31.700.0640	32.070.0175	32.070.0185
48	31.700.0650	32.070.0176	32.070.0186

Erstellt <i>Prepared</i>	10.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Fussauflage 2-teilig hochklappbar Two-piece flip-up footrest			Blatt / An <i>Sheet / no.</i> 1 / 1 Index / <i>Re</i> A
Geändert <i>Modified</i>	02.11.2009	PW				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	02.11.2008	TN				
Status <i>Status</i>						
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>		
			LAE	50.069.0920		

Sitzbreite Seat width	
35	30.100.7430
38	
40	30.100.7470
42	30.100.7410
45	30.100.7420
48	


Sitzbreite Seat width	
35	30.101.6100
38	30.100.7340
40	30.100.7360
42	30.100.7380
45	30.100.7400
48	30.100.8330

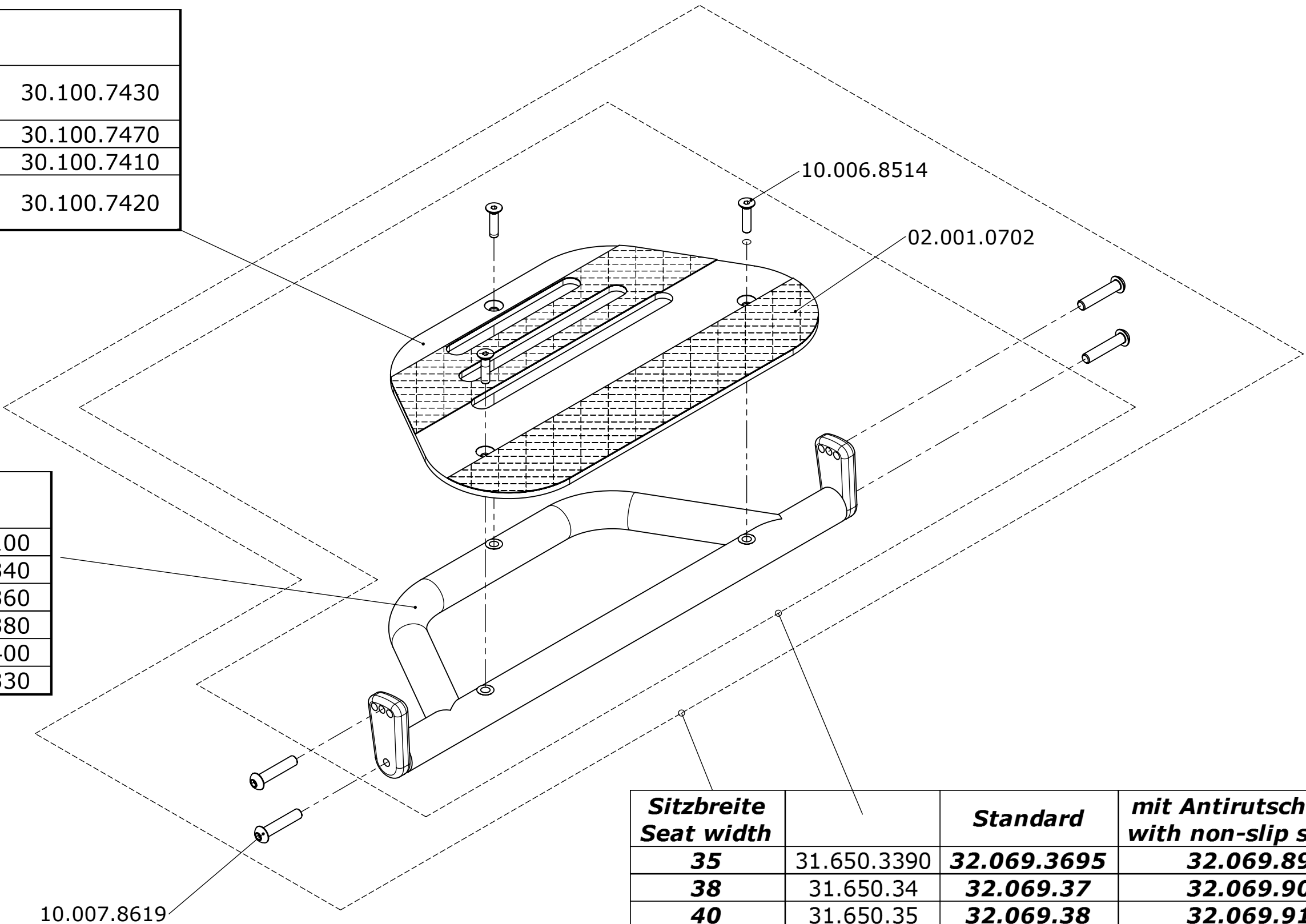

Sitzbreite Seat width		Standard	mit Antirutschband with non-slip straps
35	31.650.3390	32.069.3695	32.069.89
38	31.650.34	32.069.37	32.069.90
40	31.650.35	32.069.38	32.069.91
42	31.650.36	32.069.39	32.069.92
45	31.650.37	32.069.40	32.069.93
48	31.650.38	32.065.40	32.065.69

Erstellt <i>Prepared</i>	10.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Fussauflage einteilig starr One-piece footrest fix		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN	LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch		Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i>
Status <i>Status</i>					
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.0930	

X : (1 : 1)


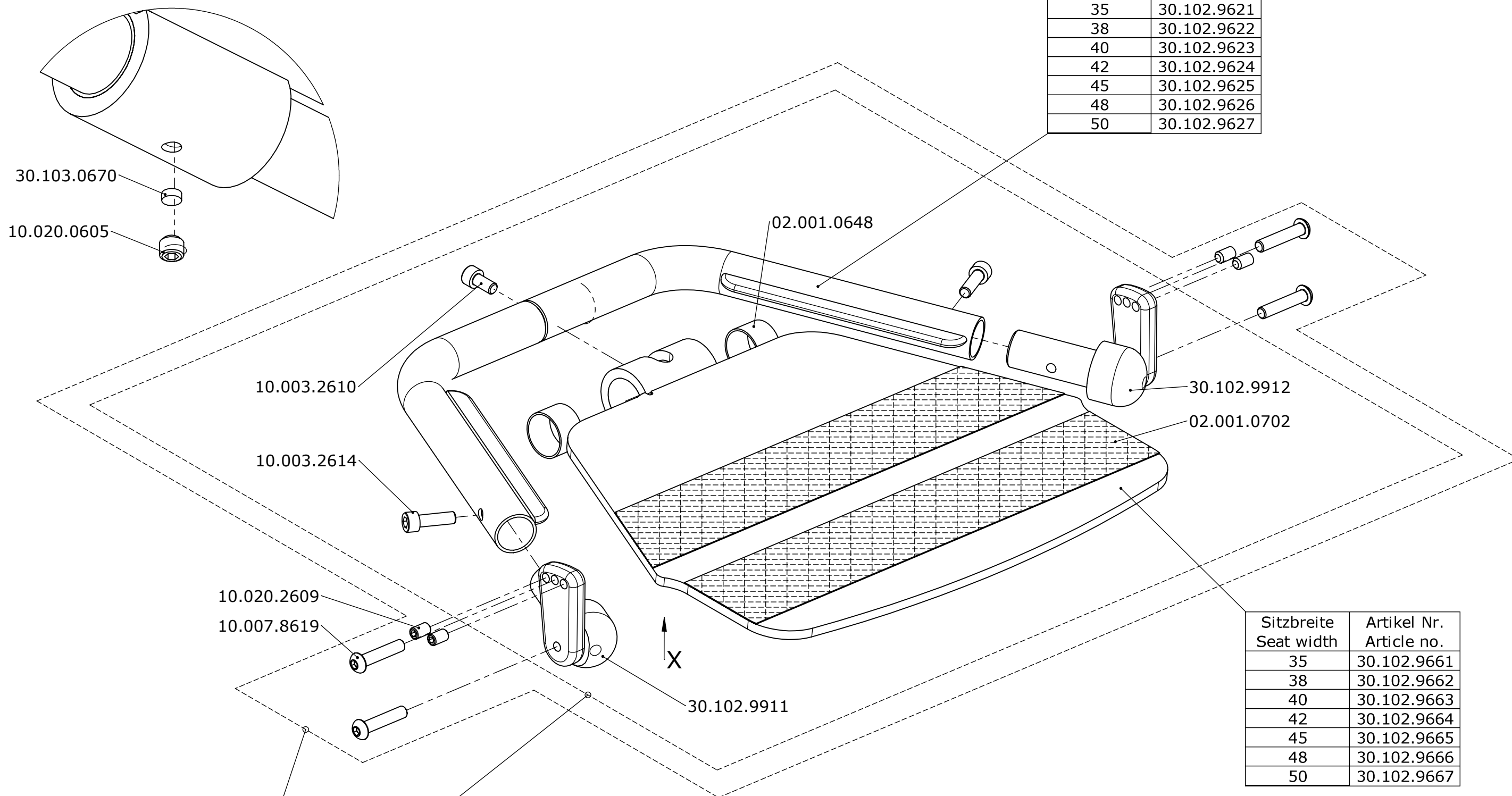


Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.
35	30.102.9621
38	30.102.9622
40	30.102.9623
42	30.102.9624
45	30.102.9625
48	30.102.9626
50	30.102.9627


Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.
35	30.102.9661
38	30.102.9662
40	30.102.9663
42	30.102.9664
45	30.102.9665
48	30.102.9666
50	30.102.9667

Sitzbreite Seat width		Standard	mit Antirutschband with non-slip straps
35	31.700.0700	32.070.0511	32.070.0521
38	31.700.0710	32.070.0512	32.070.0522
40	31.700.0720	32.070.0513	32.070.0523
42	31.700.0730	32.070.0514	32.070.0524
45	31.700.0740	32.070.0515	32.070.0525
48	31.700.0750	32.070.0516	32.070.0526
50	31.700.0760	32.070.0517	32.070.0527

Erstellt <i>Prepared</i>	26.05.2010	PW	Benennung / <i>Description</i> Fussauflage 1-teilig hochklappbar One-piece flip-up footrest			
Geändert <i>Modified</i>	18.02.2011	PW				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	18.02.2011	BM				
Status <i>Status</i>						
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / An. <i>Sheet / no.</i>	
			LAE	50.069.0950	1 / 1 Index / <i>Rev.</i> A	

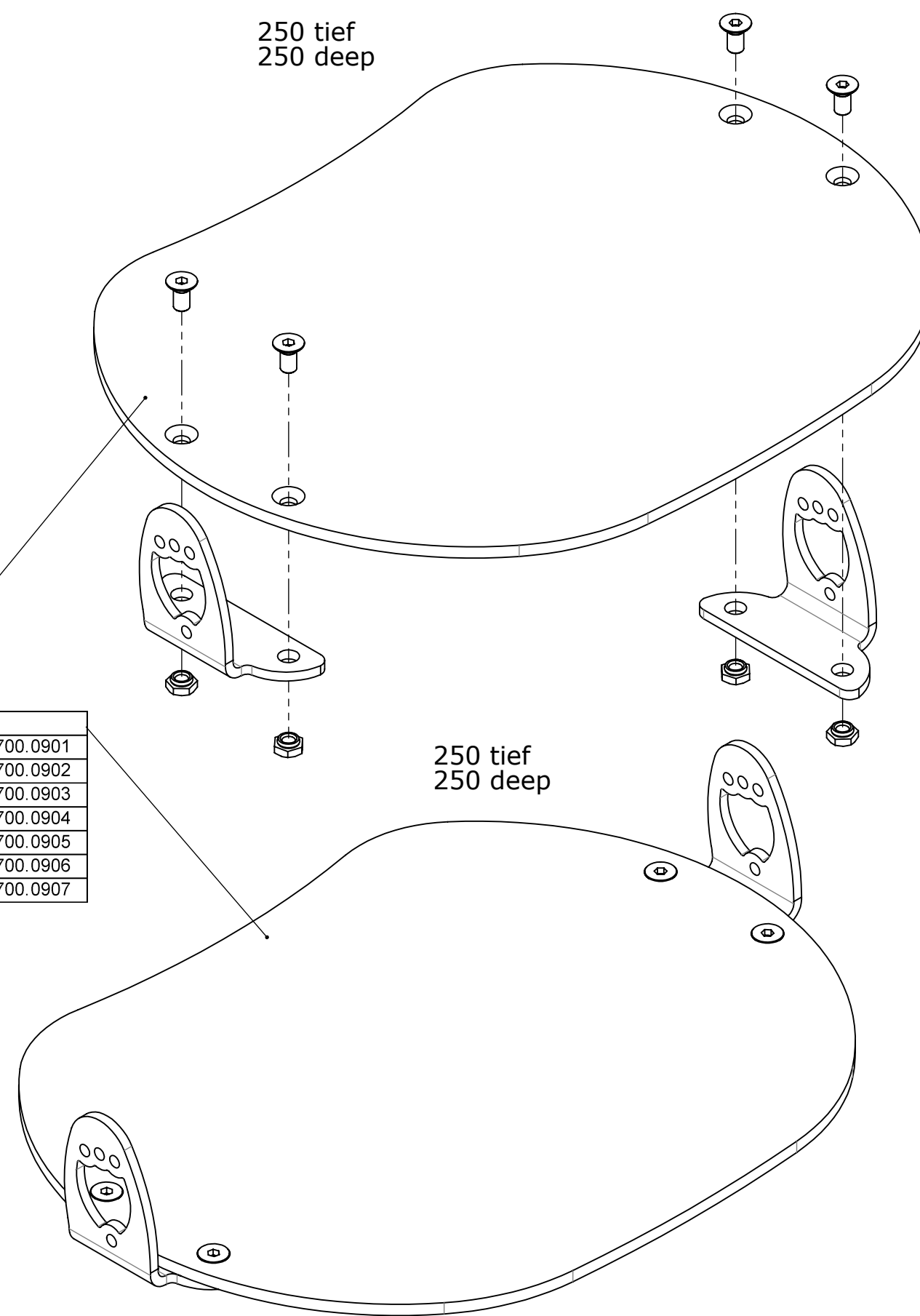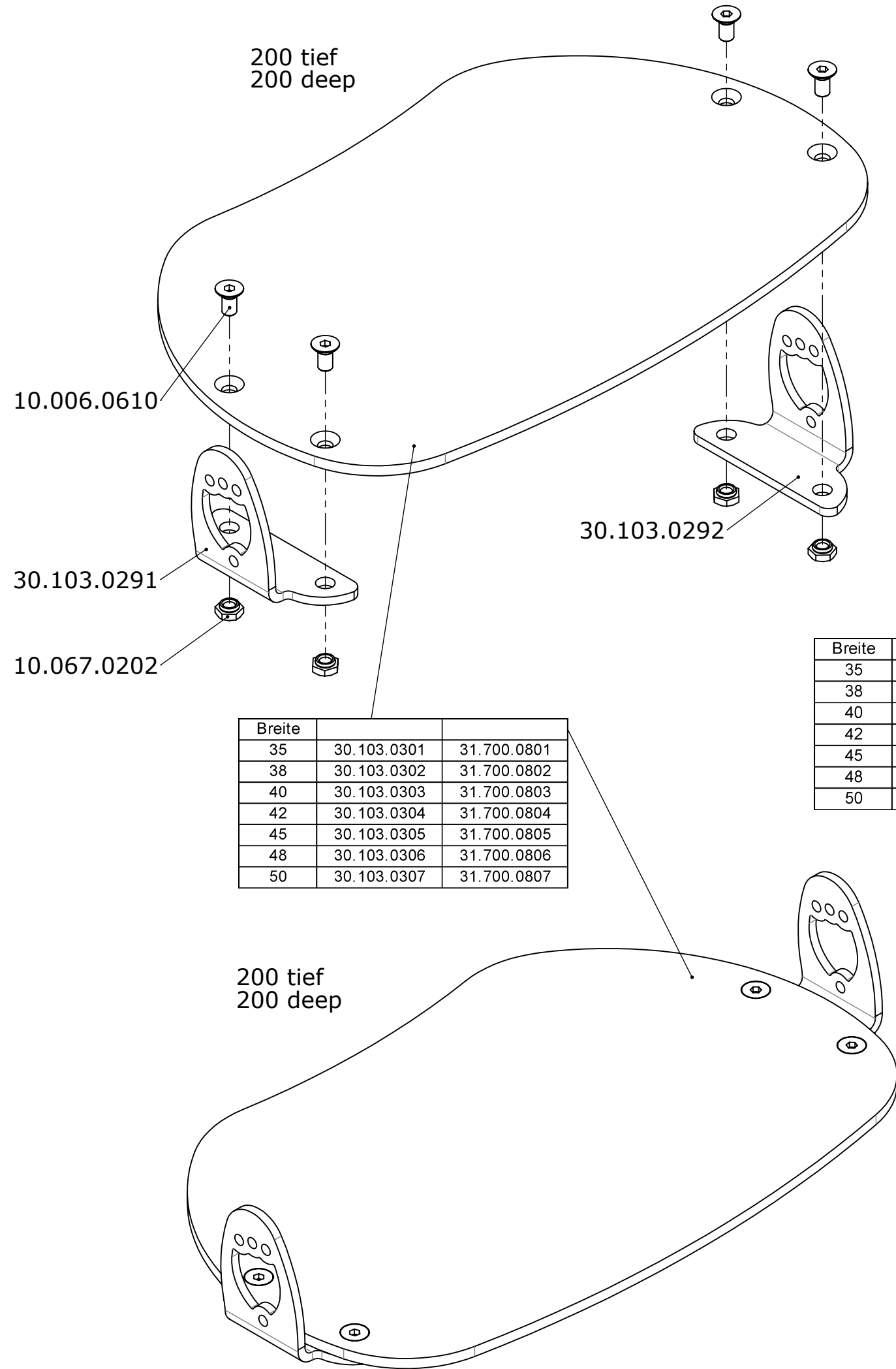

Erstellt <i>Prepared</i>	27.06.2013	PW	Benennung / <i>Description</i> Easy transfer Fussauflage Easy transfer footrest		Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> -
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	27.06.2013	FW			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.0960	

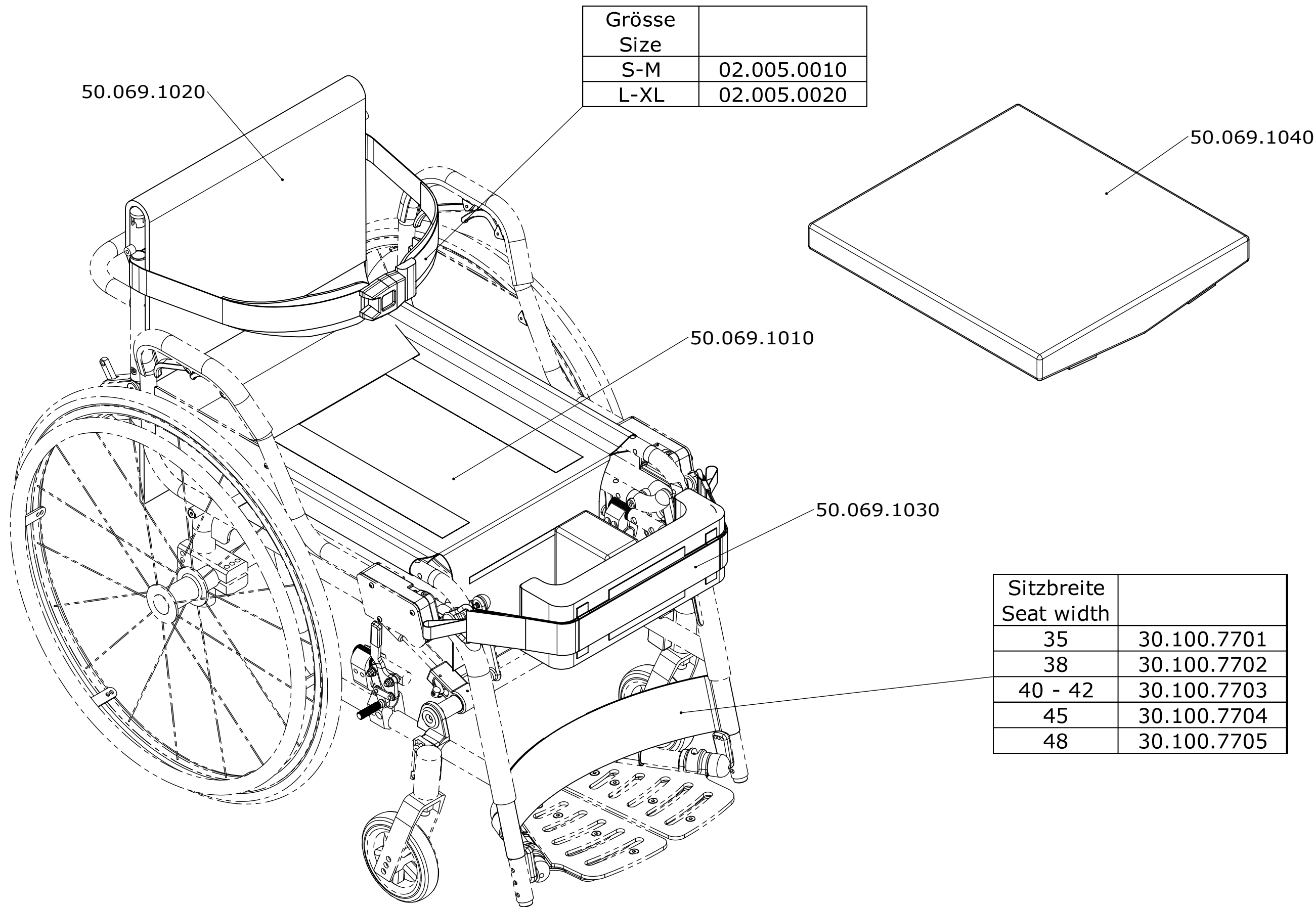


Grösse Size	
S-M	02.005.0010
L-XL	02.005.0020

Sitzbreite Seat width	
35	30.100.7701
38	30.100.7702
40 - 42	30.100.7703
45	30.100.7704
48	30.100.7705



Erstellt <i>Prepared</i>	25.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Polster und Sicherheitsgurtsystem Upholstery and safety harness		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
LEVO⁺._{dt} THE EXPERTS IN STANDING			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.1000	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> -
CH-5610 Wohlen www.levo.ch					

Grösse Size	Sitzbreite Seat width	
S/M	35	32.069.0046
	38 - 40	32.069.0023
	42	32.069.0024
	45 - 48	32.069.0025
L/XL	35	32.069.0048
	38 - 40	32.069.0029
	42	32.069.0030
	45 - 48	32.069.0031

Grösse Size	Sitzbreite Seat width	
S/M	35	30.101.5154
	38 - 40	30.101.5151
	42	30.101.5152
	45 - 48	30.101.5153
L/XL	35	30.101.3444
	38 - 40	30.101.3441
	42	30.101.3442
	45 - 48	30.101.3443

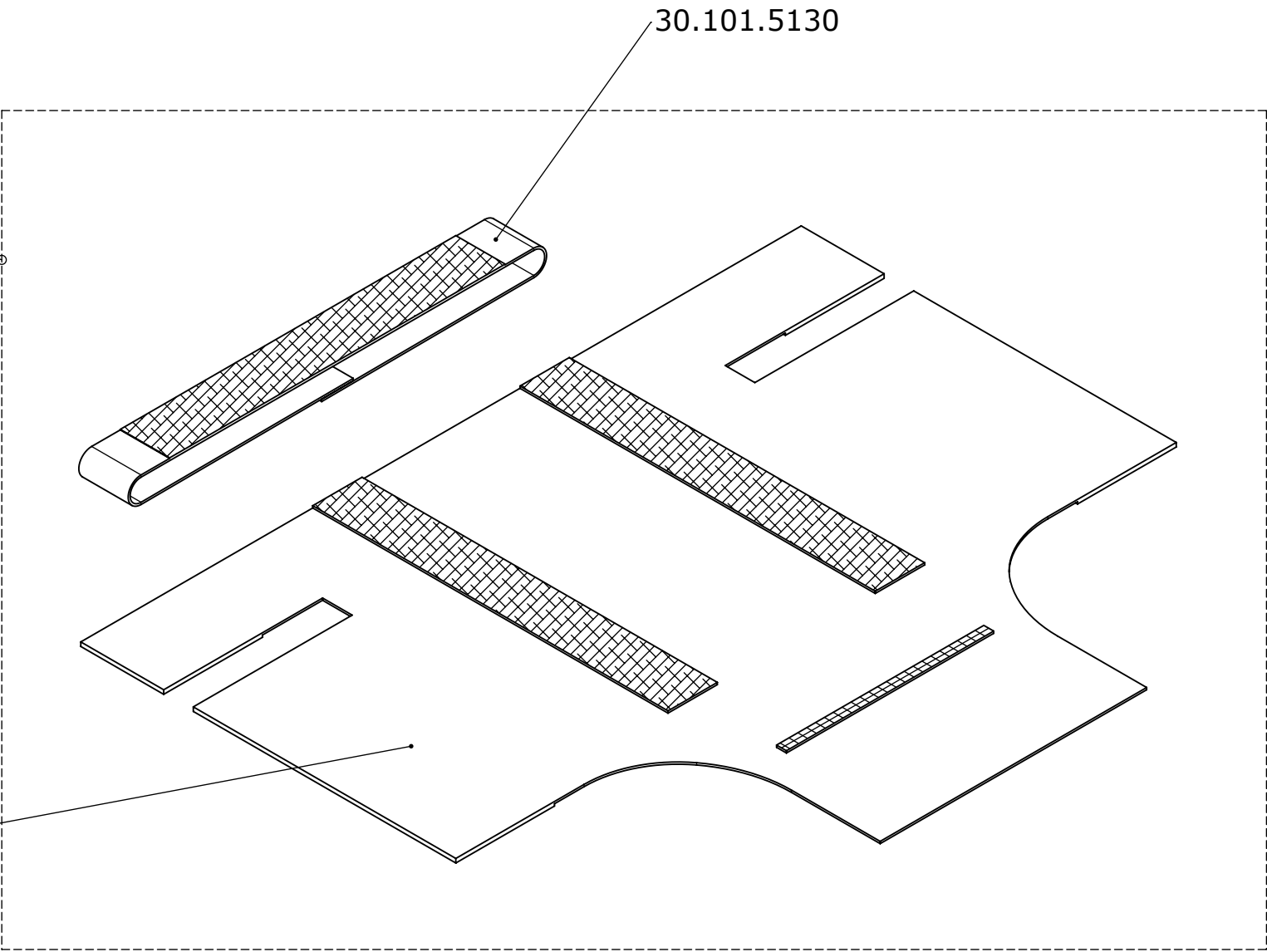

Sitzbreite Seat width	
35	30.101.3384
38 - 40	30.101.3381
42	30.101.3382
45 - 48	30.101.3383

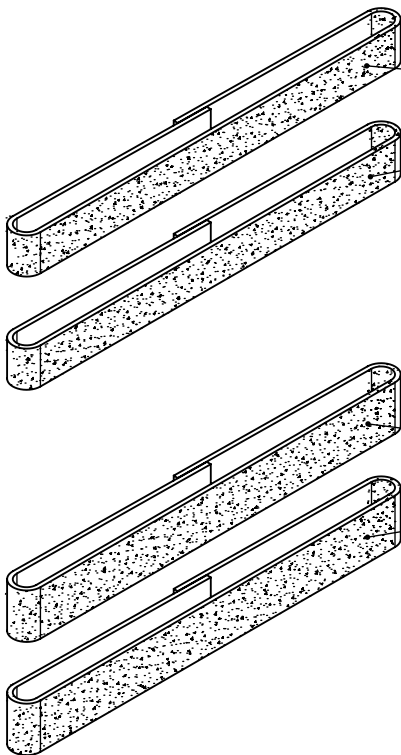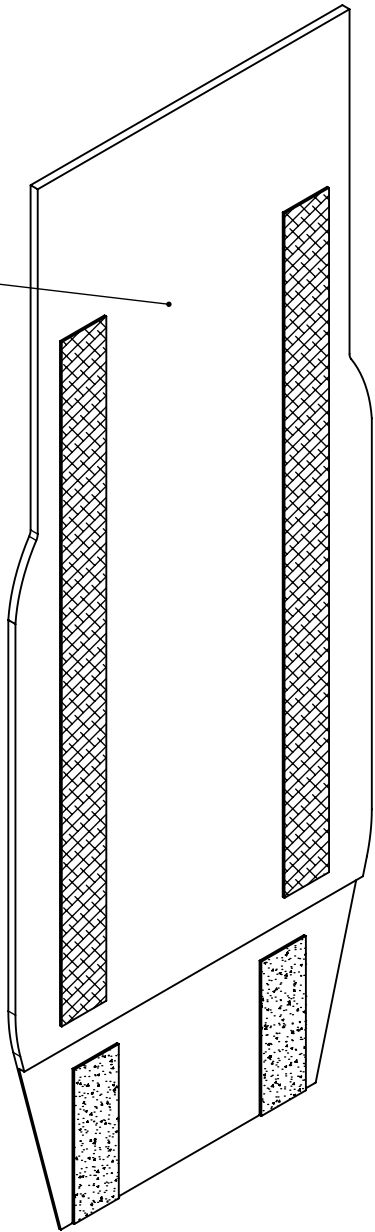

Sitzbreite Seat width	Gurt 40 Strap 40
35 - 48	30.101.3402


Sitzbreite Seat width	Gurt 50 Strap 50
35 - 48	30.101.3401

Rückenpolsterhöhe Backrest height	Gurt 40 Strap 40 [Stk./pcs.]	Gurt 50 Strap 50 [Stk./pcs.]
31	2	2
33	3	2
35	3	2
37	2	3
39	4	2
41	2	4

Erstellt <i>Prepared</i>	12.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Rückenpolster Backrest upholstery		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i>
			LAE	50.069.1020	1 / 1 Index / <i>Rev.</i>

Dimension	
50x100	30.101.5391
60x100	30.101.5392
80x100	30.101.5393
50x150	30.101.5394
80x150	30.101.5395

Dimension	
50-100x100	30.101.8221
90-140x100	30.101.8222
130-180x100	30.101.8223

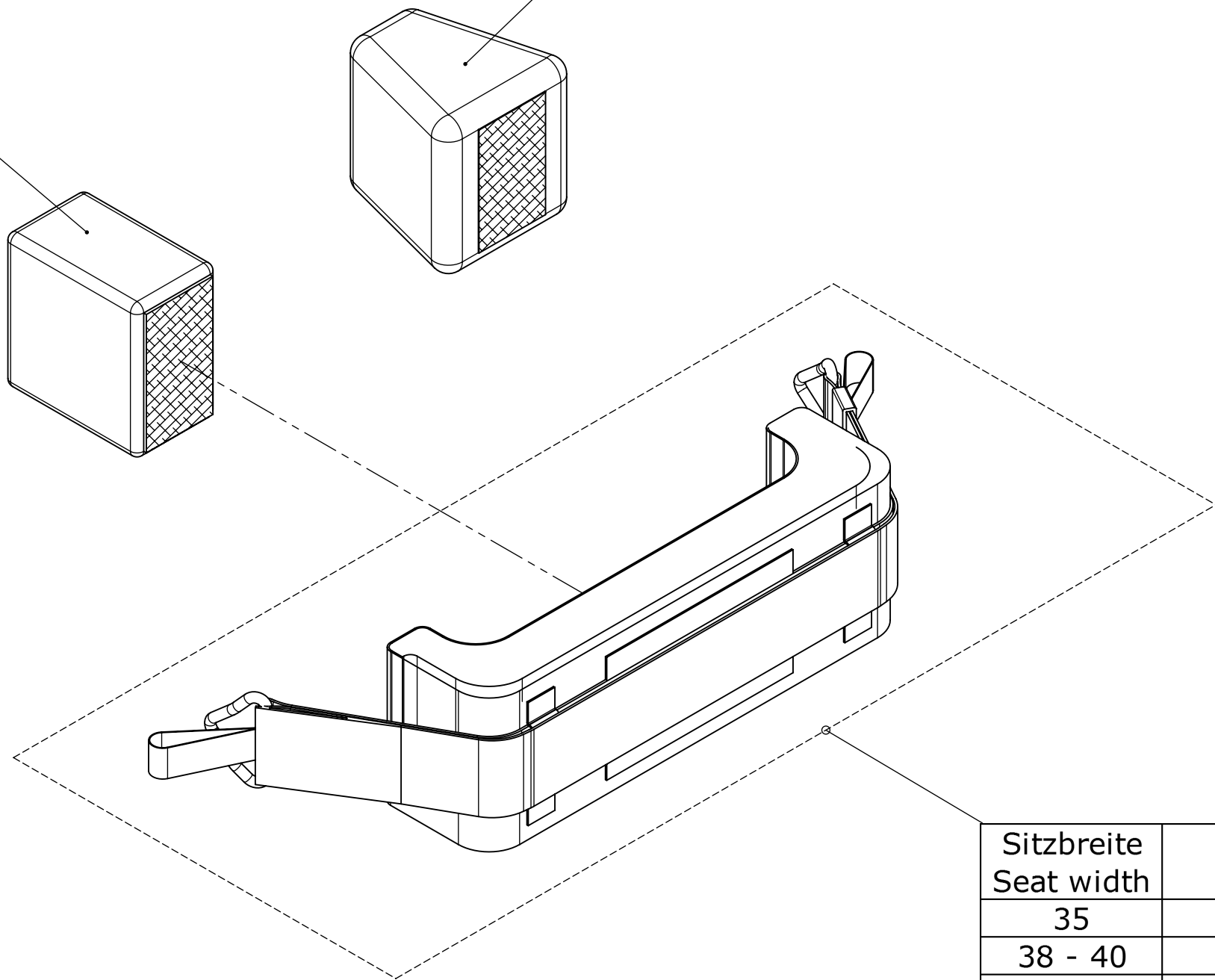


Standard Kombination:
Standard combination:

Sitzbreite Seat width	Typ Type	Kniekeil Wedge
35	2	50x100
38 - 40	3	60x100
42	4	
45	5	80x100
48	6	

Sitzbreite Seat width	Typ Type	
35	2	30.101.5403
38 - 40	3	30.101.5405
42	4	30.101.5407
45	5	30.101.5408
48	6	30.901.5403


Erstellt Prepared	12.09.2007	PW	Benennung / Description Kniehalter Knee support		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	TN	Rollstuhl Wheelchair LAE		Artikelnummer Art. no. 50.069.1030
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch		

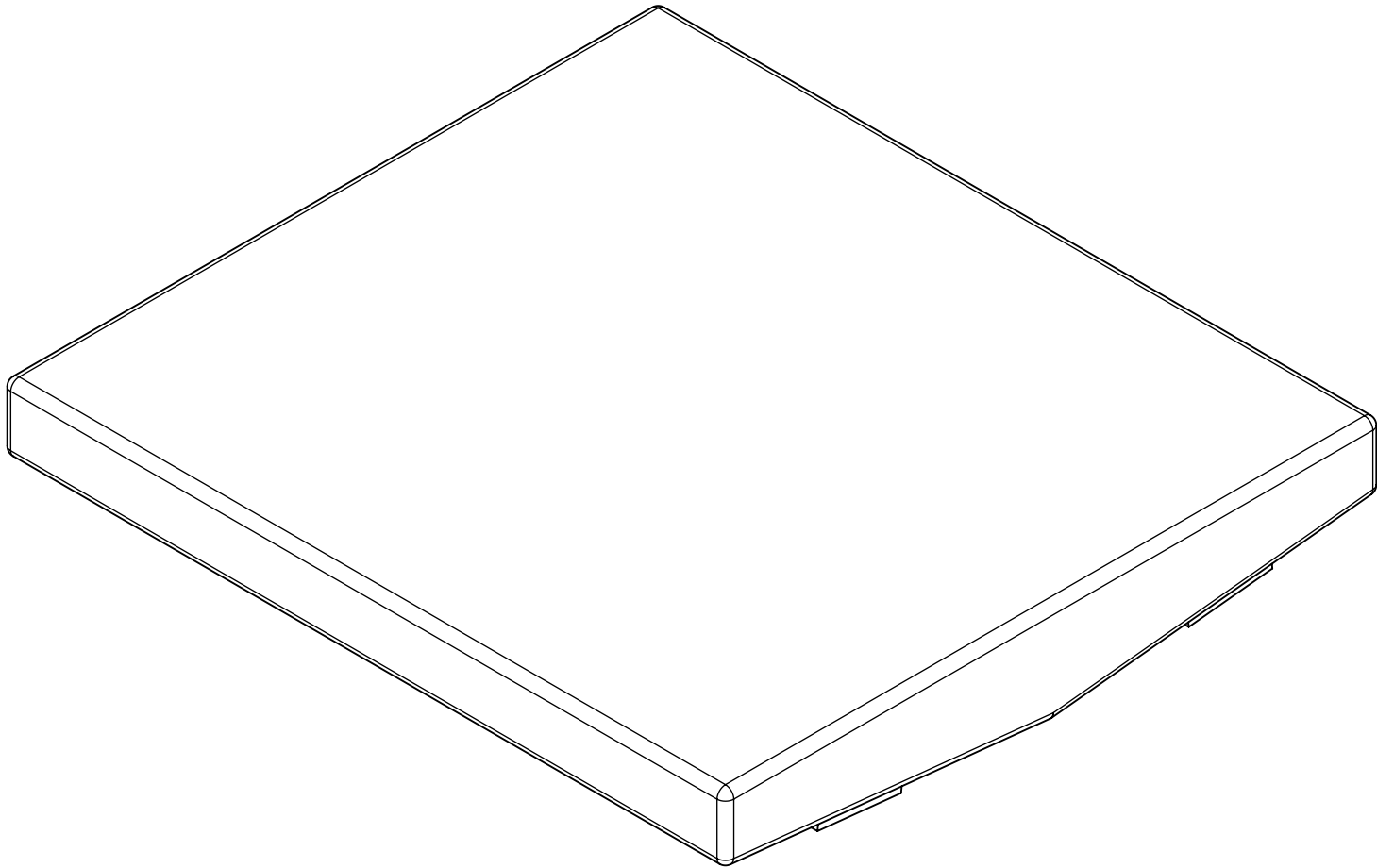


Grösse Size	Sitzbreite Seat width	Sitzkissen Seat cushion	Ersatzbezug Spare cover
S	35	30.100.3740	30.100.3741
	38	30.100.3770	30.100.3771
	40	30.100.3780	30.100.3781
	42	30.100.3790	30.100.3791
	45	30.100.3800	30.100.3801
	48	30.100.3802	30.100.3804
M	35	30.100.3822	30.100.3823
	38	30.100.3820	30.100.3821
	40	30.100.3830	30.100.3831
	42	30.100.3840	30.100.3841
	45	30.100.3850	30.100.3851
	48	30.100.3855	30.100.3854
L	35	30.100.3857	30.100.3858
	38	30.100.3860	30.100.3861
	40	30.100.3870	30.100.3871
	42	30.100.3880	30.100.3881
	45	30.100.3890	30.100.3891
	48	30.100.3900	30.100.3901
XL	35	30.100.3907	30.100.3908
	38	30.100.3910	30.100.3911
	40	30.100.3920	30.100.3921
	42	30.100.3930	30.100.3931
	45	30.100.3940	30.100.3941
	48	30.100.3950	30.100.3951

Erstellt <i>Prepared</i>	12.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Sitzkissen Seat cushion			
Geändert <i>Modified</i>		-				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN				
Status <i>Status</i>						
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i>	
			LAE	50.069.1040	1 / 1 Index / Rev.	


50.069.5100

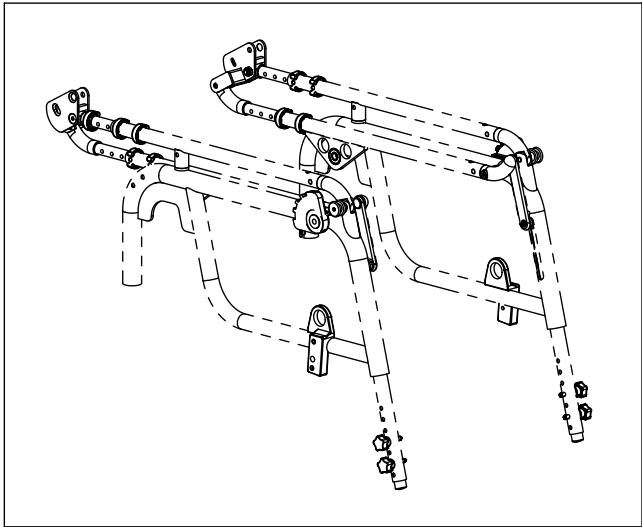


50.069.5200

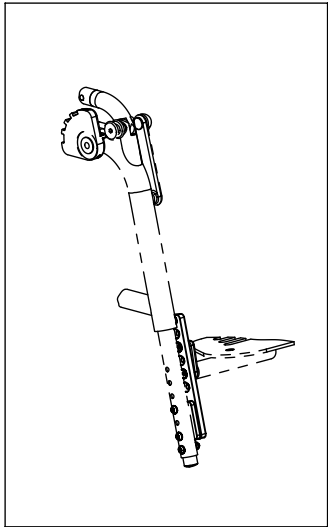


50.069.5300

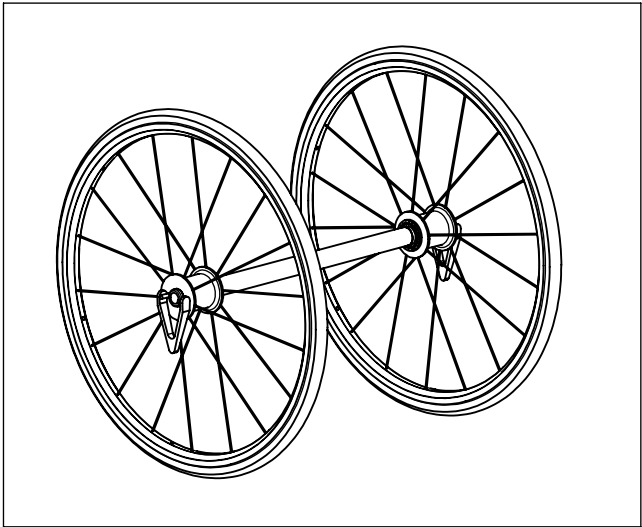


50.069.5400

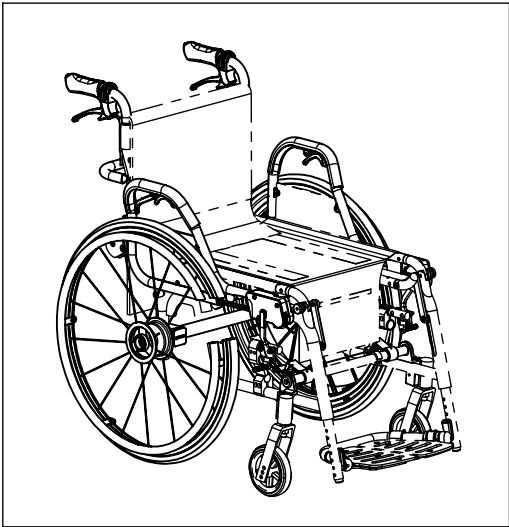


50.069.5500

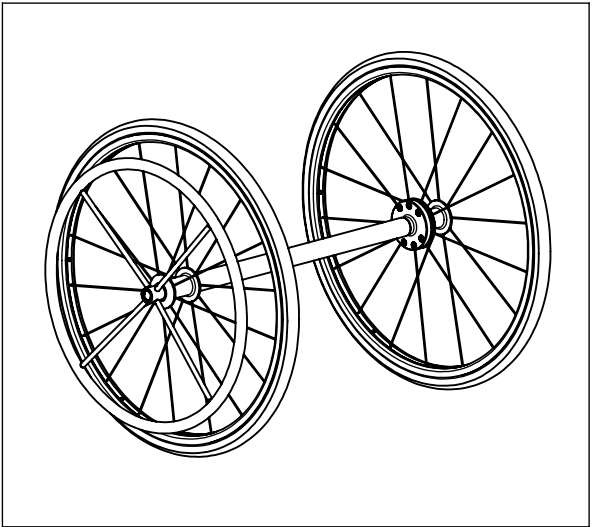


50.069.5600

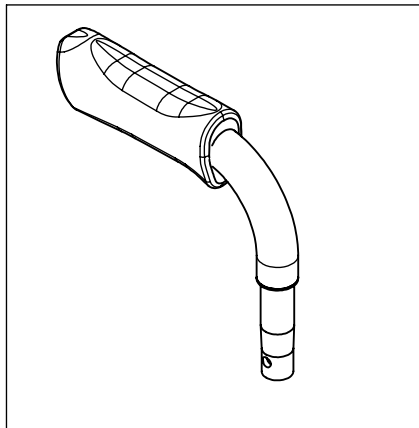


50.069.5700

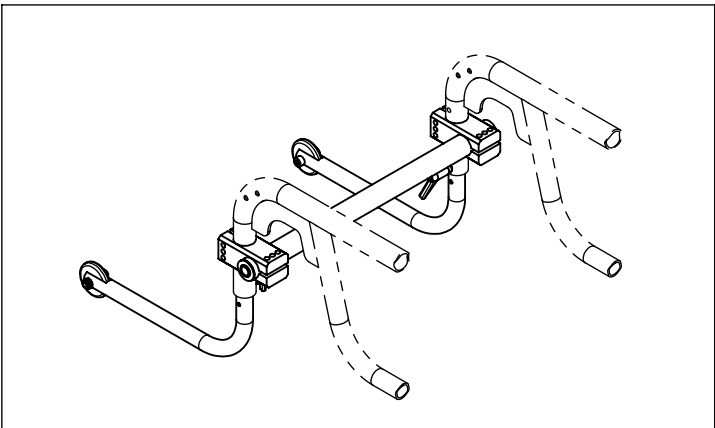


50.069.5800

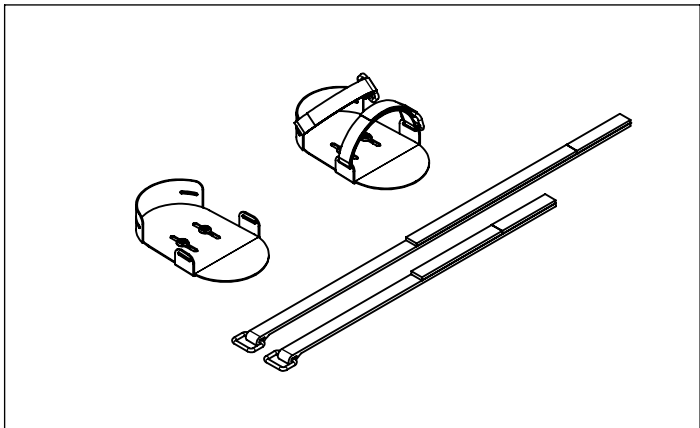


50.069.5900

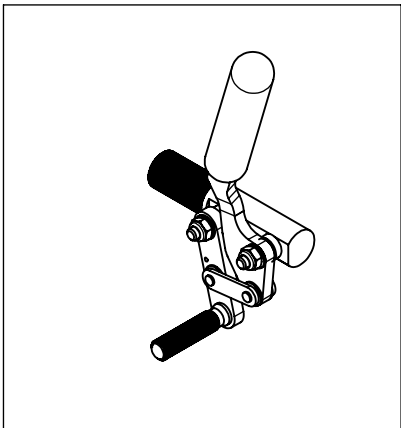


50.069.6000

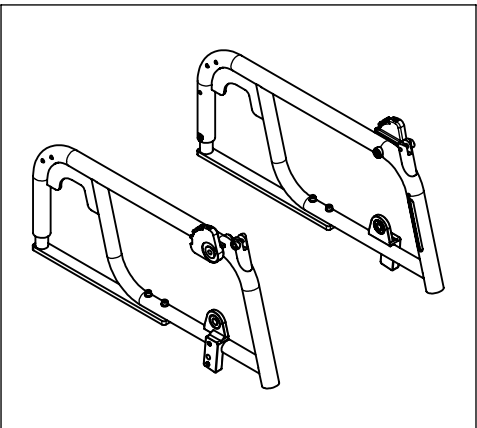


50.069.6200

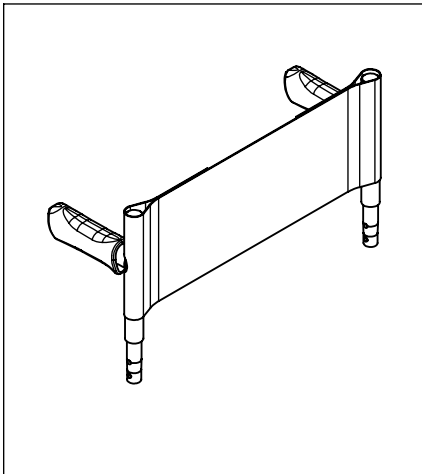


50.069.6300

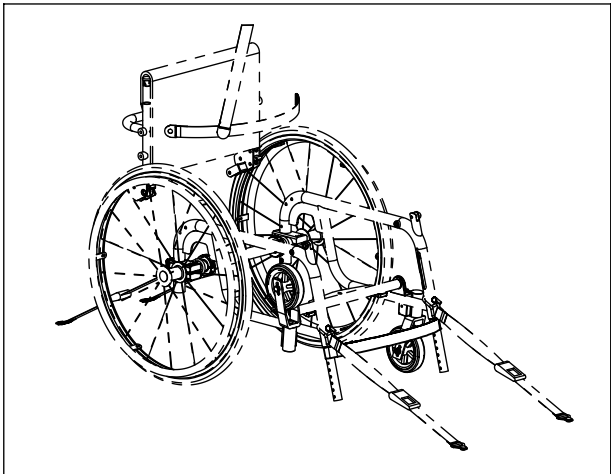

50.069.6400

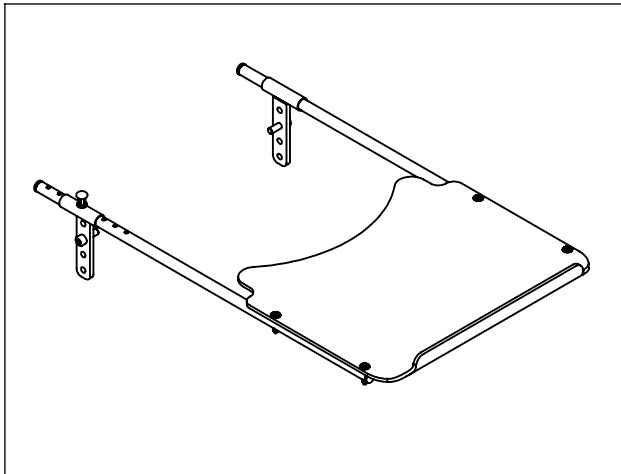


Erstellt Prepared	28.09.2007	PW	Benennung / Description Optionen & Zubehör options & accessories		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev. A
Geändert Modified	16.02.2011	PW			
Gepr./Freig. Approved	16.02.2011	BM			
Status Status					
LEVO  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair LAE	Artikelnummer Art. no. 50.069.5000	

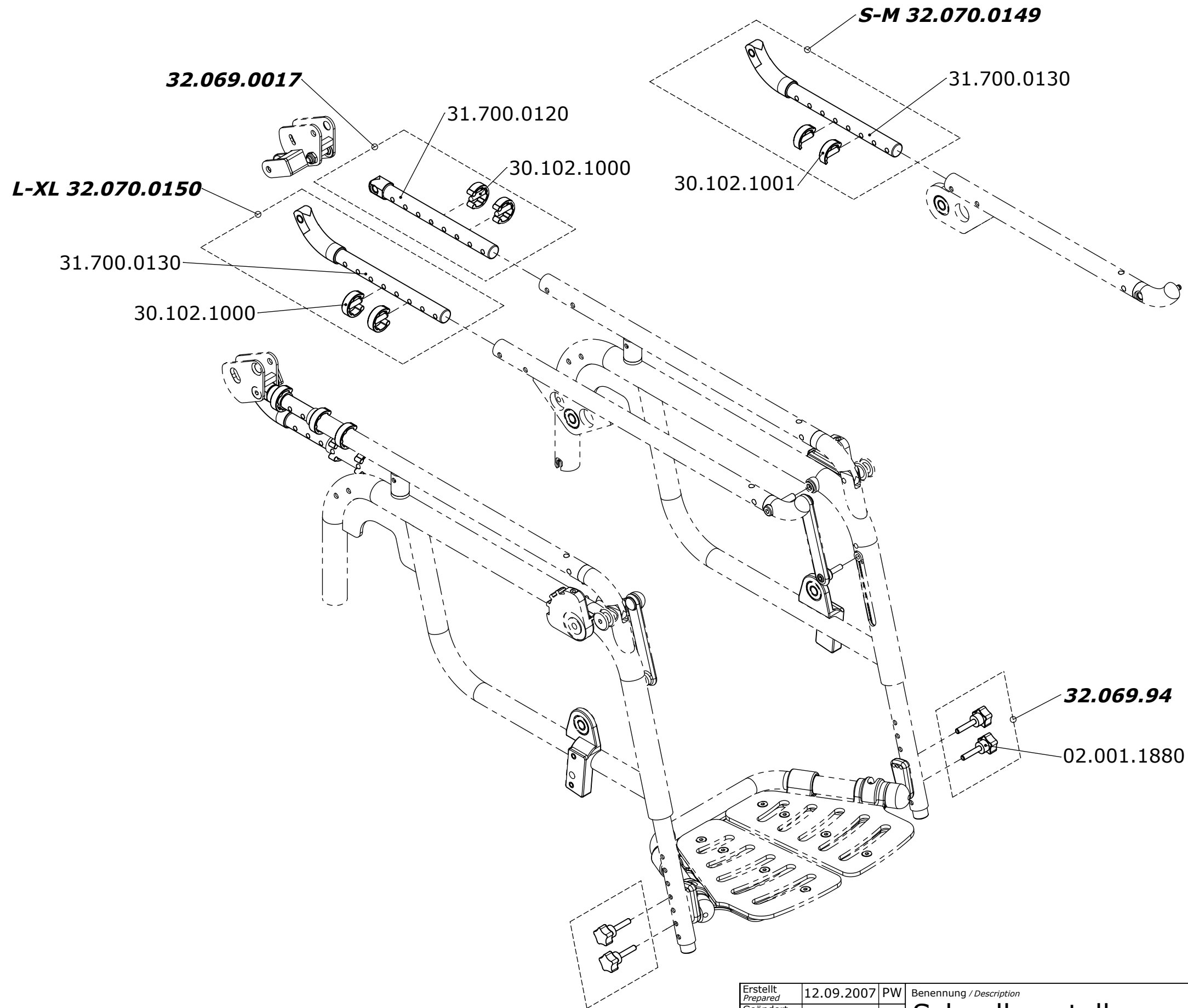

Set:
S-M 32.069.0101
L-XL 32.069.0102

Erstellt Prepared	12.09.2007	PW	Benennung / Description Schnellverstellung Quick adjustment		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	TN			
Status Status					
LEVO ⁺ LEVO AG THE EXPERTS IN STANDING CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair LAE	Artikelnummer Art. no. 50.069.5100	


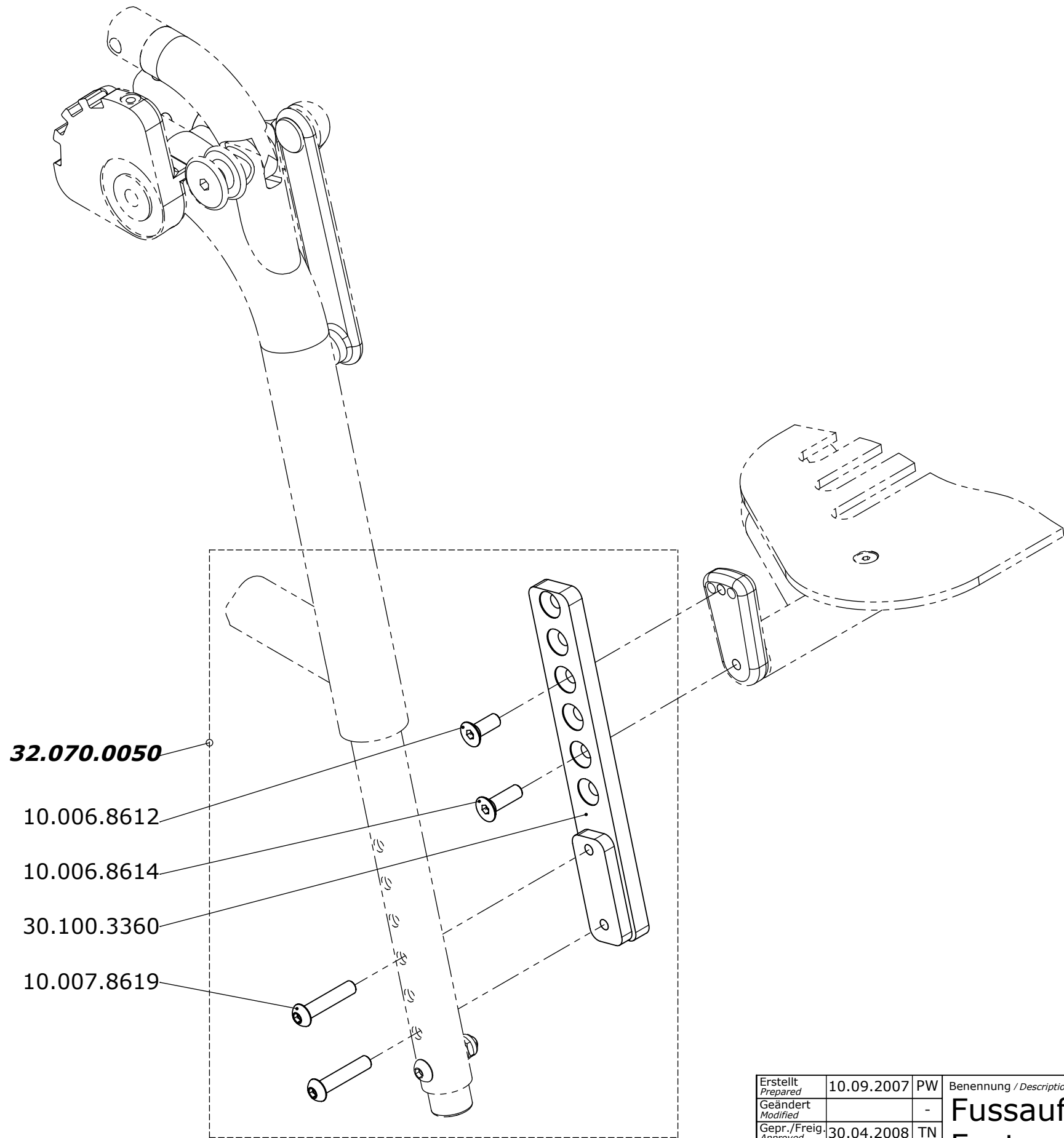


Erstellt <i>Prepared</i>	10.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Fussauflagenhöhenadapter Footrest height adapter		Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i>
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
LEVO  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.5200	

Sitzbreite Seat width	
35	31.102.1690
38	31.100.2640
40	31.100.2710
42	31.100.2720
45	31.100.2730
48	31.102.4340

02.001.1323

50.070.0730

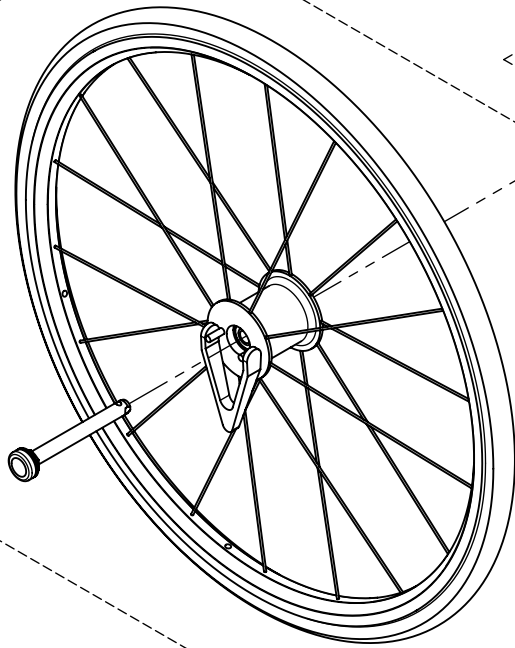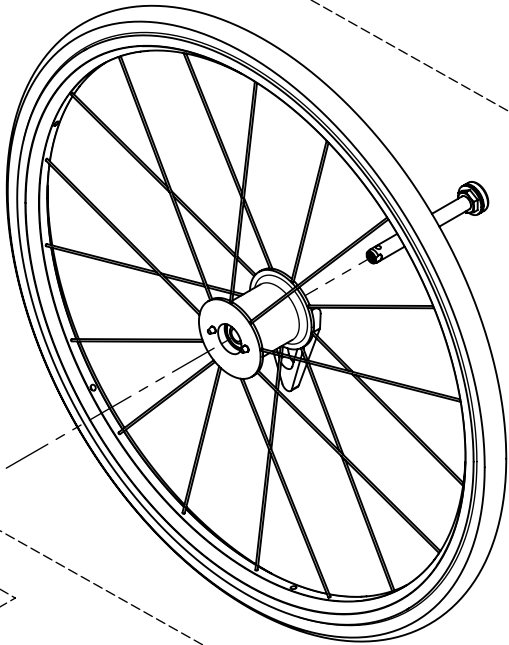


Sitzbreite Seat width	
35	32.069.1006
38	32.069.1001
40	32.069.1002
42	32.069.1003
45	32.069.1004
48	32.069.1005

Erstellt Prepared	11.09.2007	PW	Benennung / Description Nabenfeststellbremse Hub locking brake		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	PW			
Status Status					
LEVO  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair LAE	Artikelnummer Art. no. 50.069.5300	

Set	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	32.065.18	32.065.1910
24"	32.065.19	32.065.1920
26"	32.065.1901	32.065.1930

rechts right	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	02.010.0011	02.010.0016
24"	02.010.0021	02.010.0026
26"	02.010.0031	02.010.0036

Sitzbreite Seat width	Artikelnummer/ Article no.
35	31.690.0641
38	31.690.0642
40	31.690.0643
42	31.690.0644
45	31.690.0645
48	31.690.0646

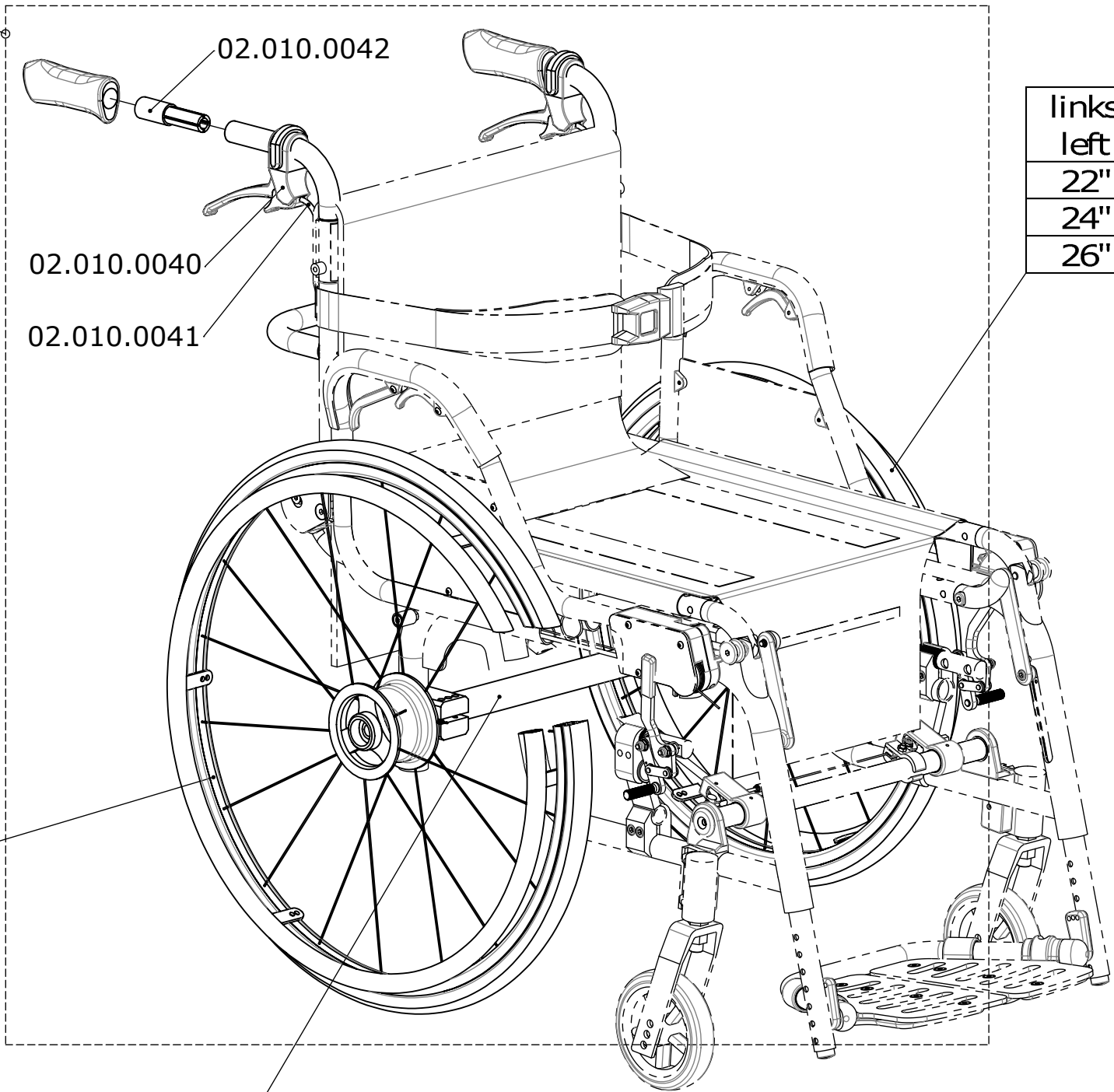


links left	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	02.010.0012	02.010.0017
24"	02.010.0022	02.010.0027
26"	02.010.0032	02.010.0037

Erstellt <i>Prepared</i>	26.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Trommelbremse Drum brake		
Geändert <i>Modified</i>	28.06.2013	PW			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	01.07.2013	FW			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
LEVO⁺.dt THE EXPERTS IN STANDING			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.5400	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> A

Sitzbreite Seat width	
35	32.069.0139
38	32.069.0140
40	32.069.0141
42	32.069.0142
45	32.069.0143
48	32.069.0144



Sitzbreite Seat width	
35	30.102.0901
38	30.101.3652
40	30.101.3653
42	30.102.0902
45	30.102.0903
48	30.101.3657

30.101.3890
10.050.0017
10.006.4814

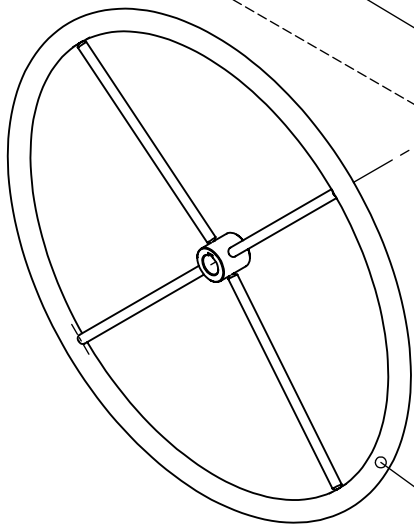



22"	30.102.0721
24"	30.102.0722
26"	30.102.0723

10.055.0509

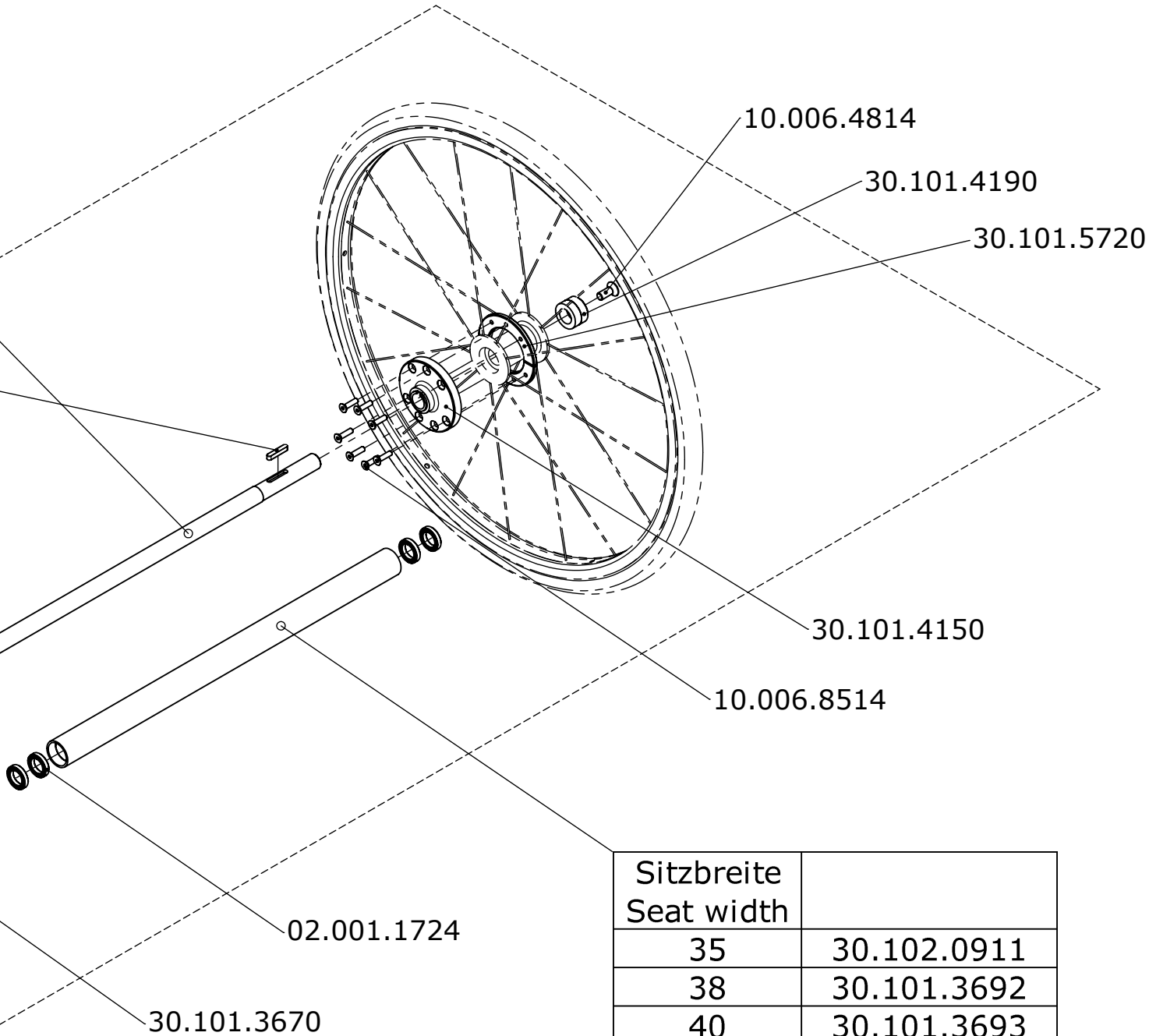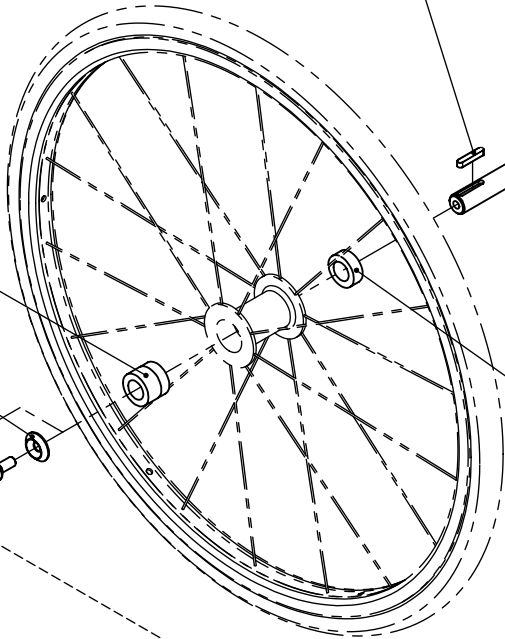


Sitzbreite Seat width	
35	30.102.0911
38	30.101.3692
40	30.101.3693
42	30.102.0912
45	30.102.0913
48	30.101.3697


Erstellt Prepared	11.09.2007	PW	Benennung / Description Einarmantrieb One arm drive	
Geändert Modified	27.04.2011	PW		
Gepr./Freig. Approved	27.04.2011	BM		
Status Status				
LEVO  LEVO AG THE EXPERTS IN STANDING CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair LAE	Artikelnummer Art. no. 50.069.5500
				Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev. A

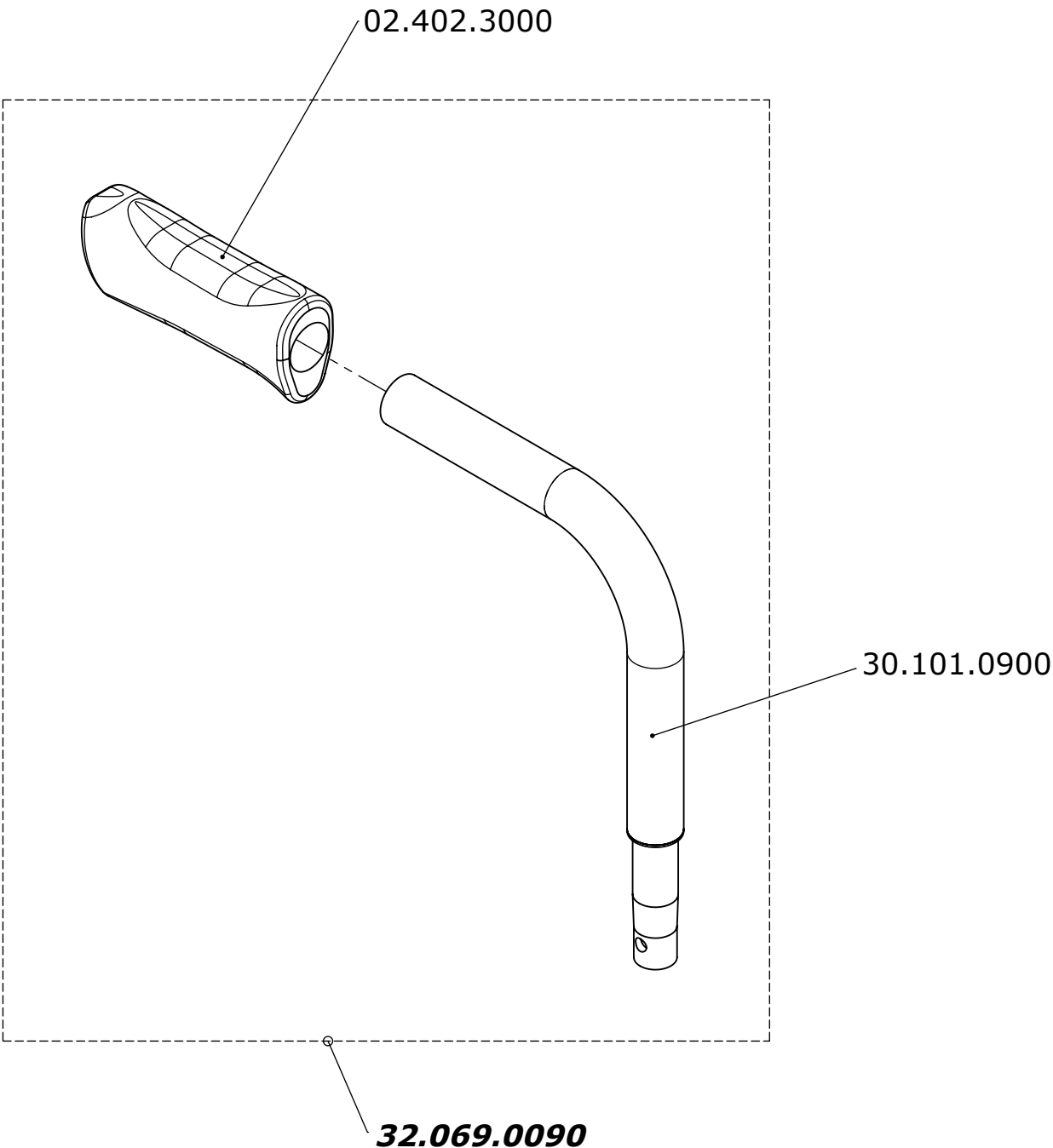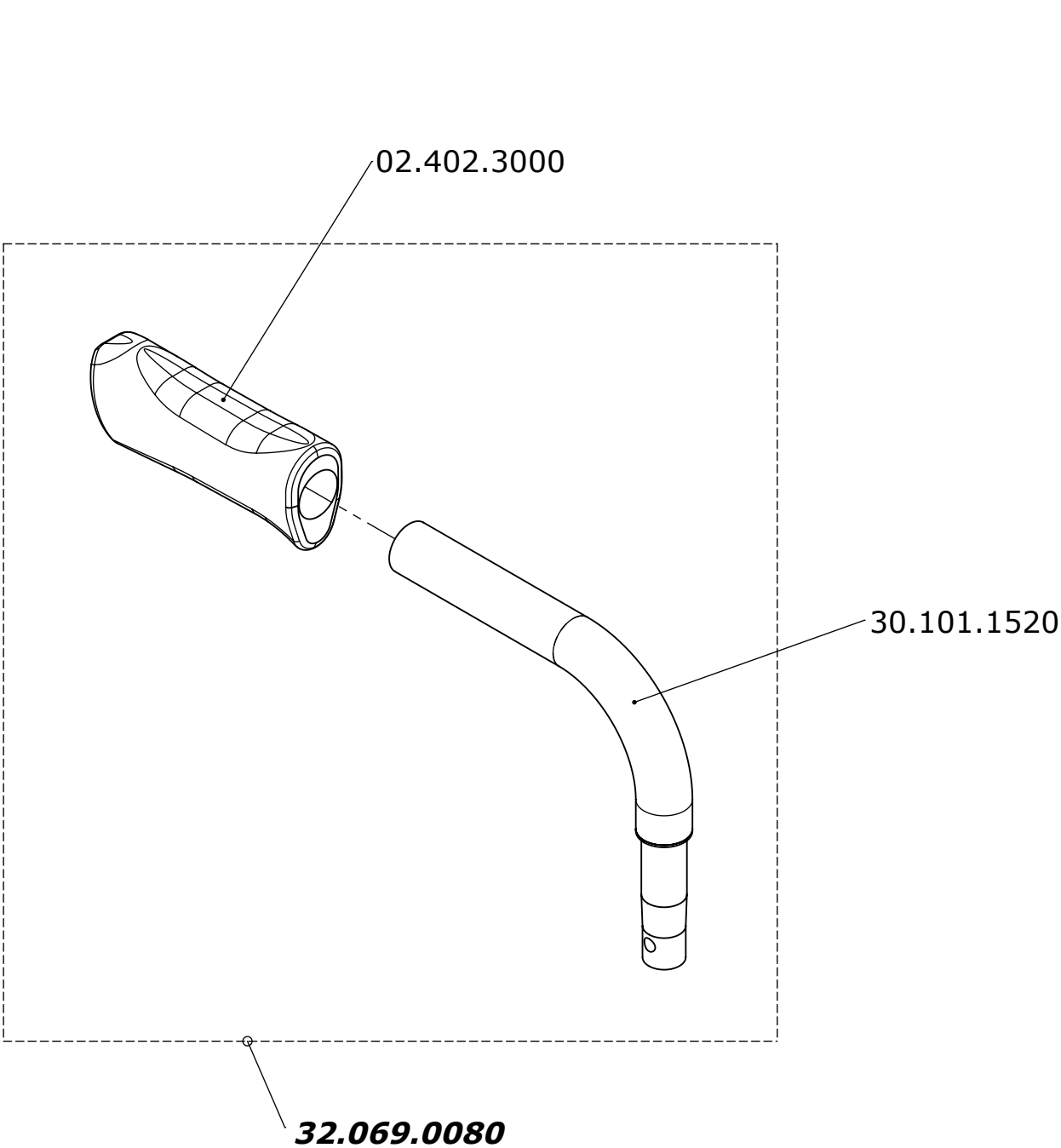


Erstellt <i>Prepared</i>	11.09.2007	PW	Benennung / Description Schiebegriffe Push handles		Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
LEVO  LEVO AG THE EXPERTS IN STANDING CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.5600	

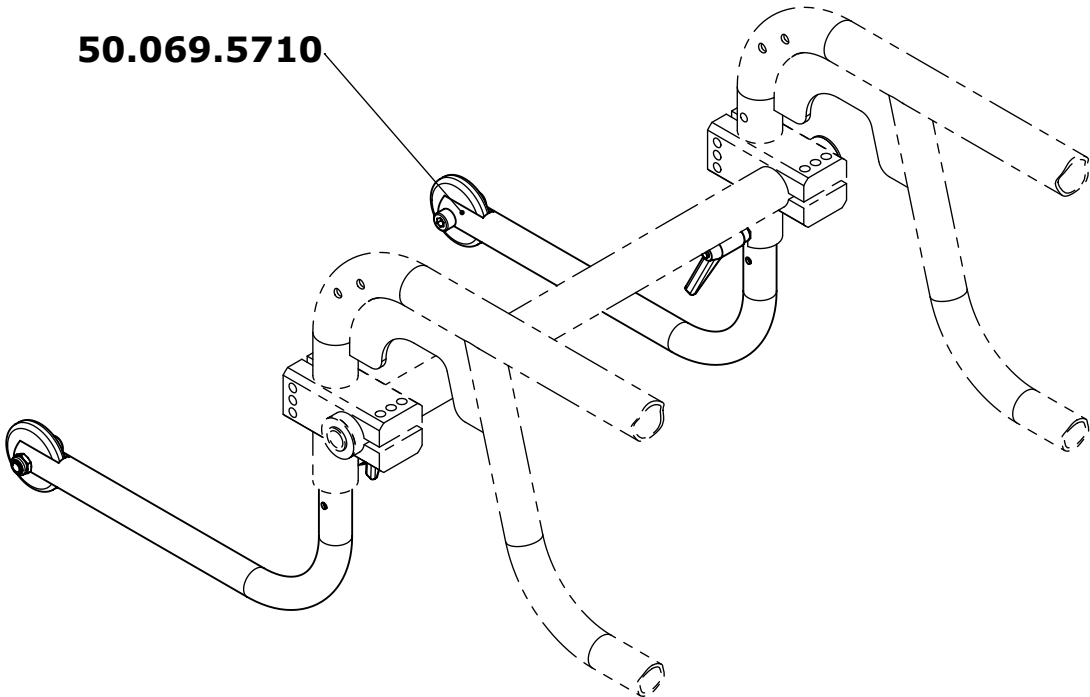

50.069.5710

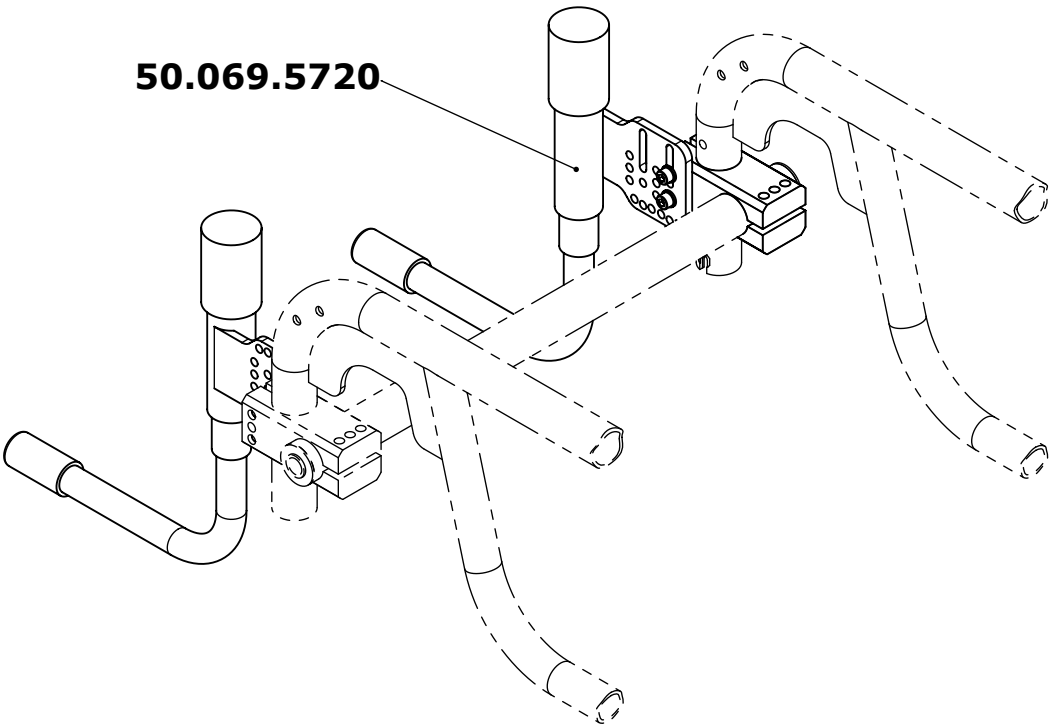


50.069.5720

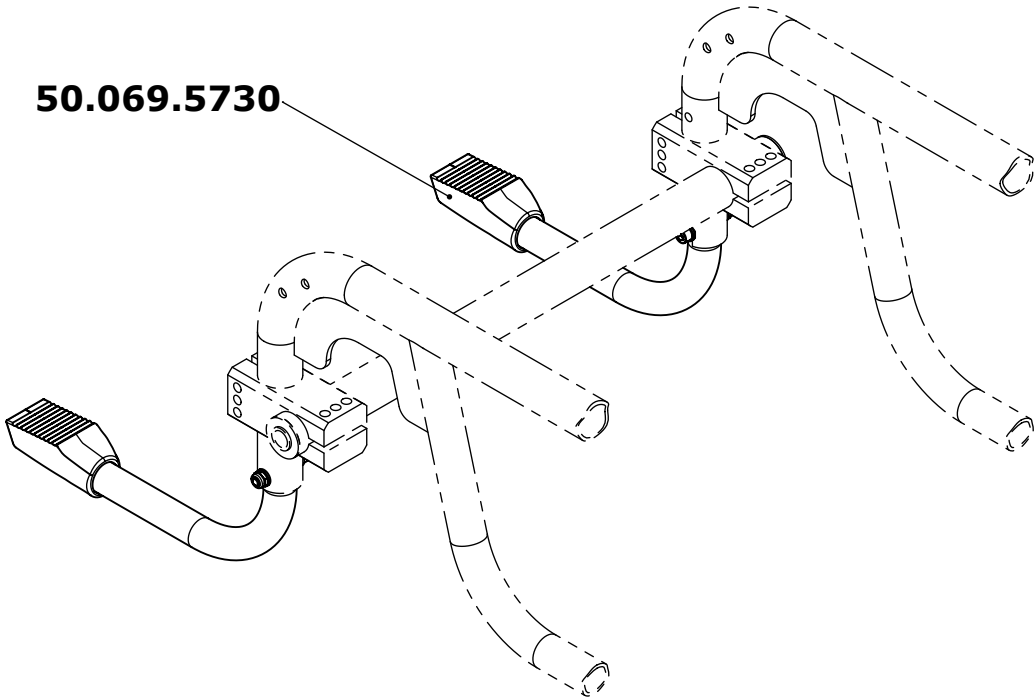

50.069.5730


Erstellt <i>Prepared</i>	11.09.2007	PW	Benennung / Description Kippen Tip		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
LEVO [®]  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.5700	

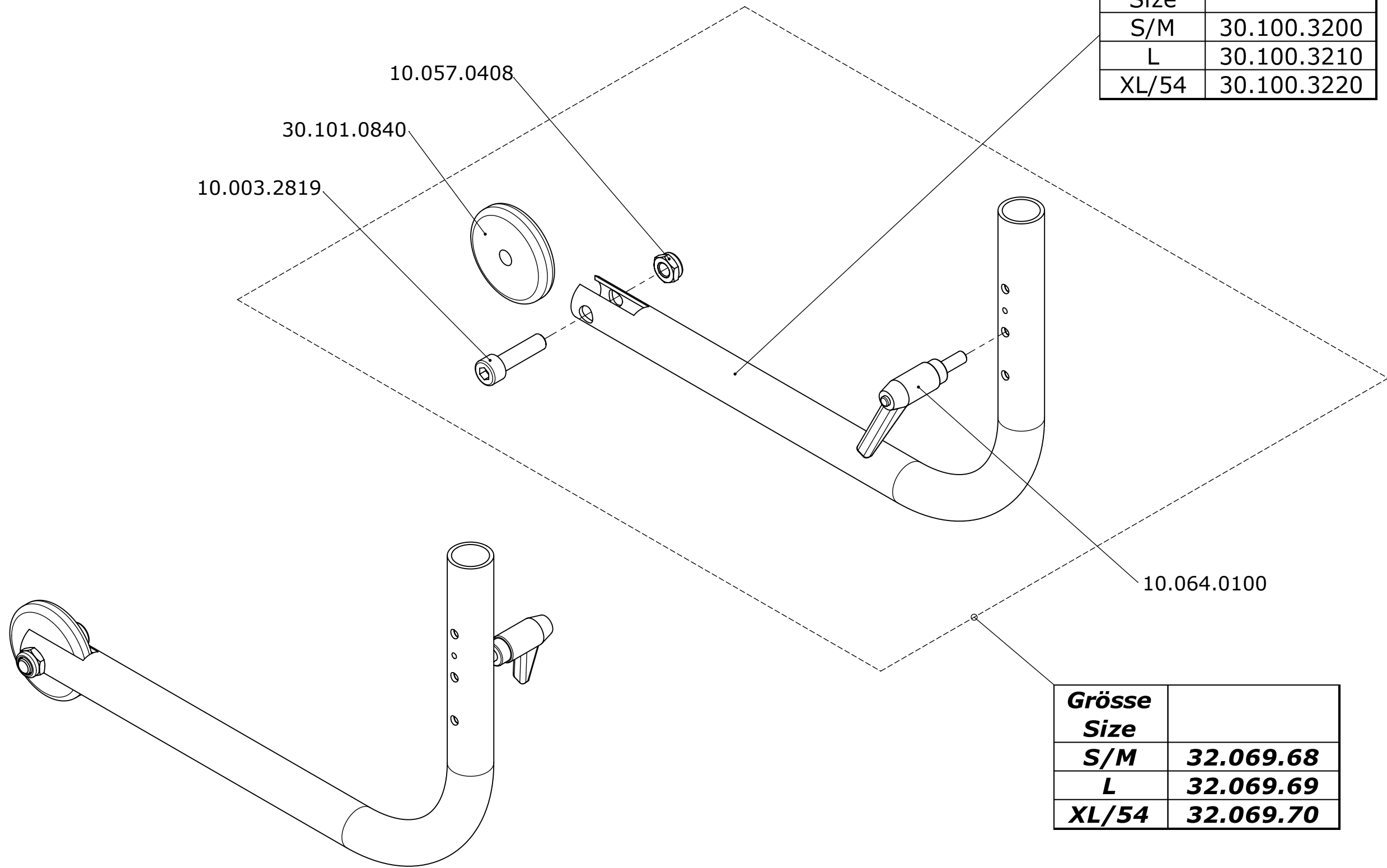


Grösse Size	
S/M	30.100.3200
L	30.100.3210
XL/54	30.100.3220

Grösse Size	
S/M	32.069.68
L	32.069.69
XL/54	32.069.70


Erstellt <i>Prepared</i>	11.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Antikipprollen Anti-tip rolls			
Geändert <i>Modified</i>		-				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	PW				
Status <i>Status</i>						
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.5710	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1	
					Index / <i>Rev.</i>	

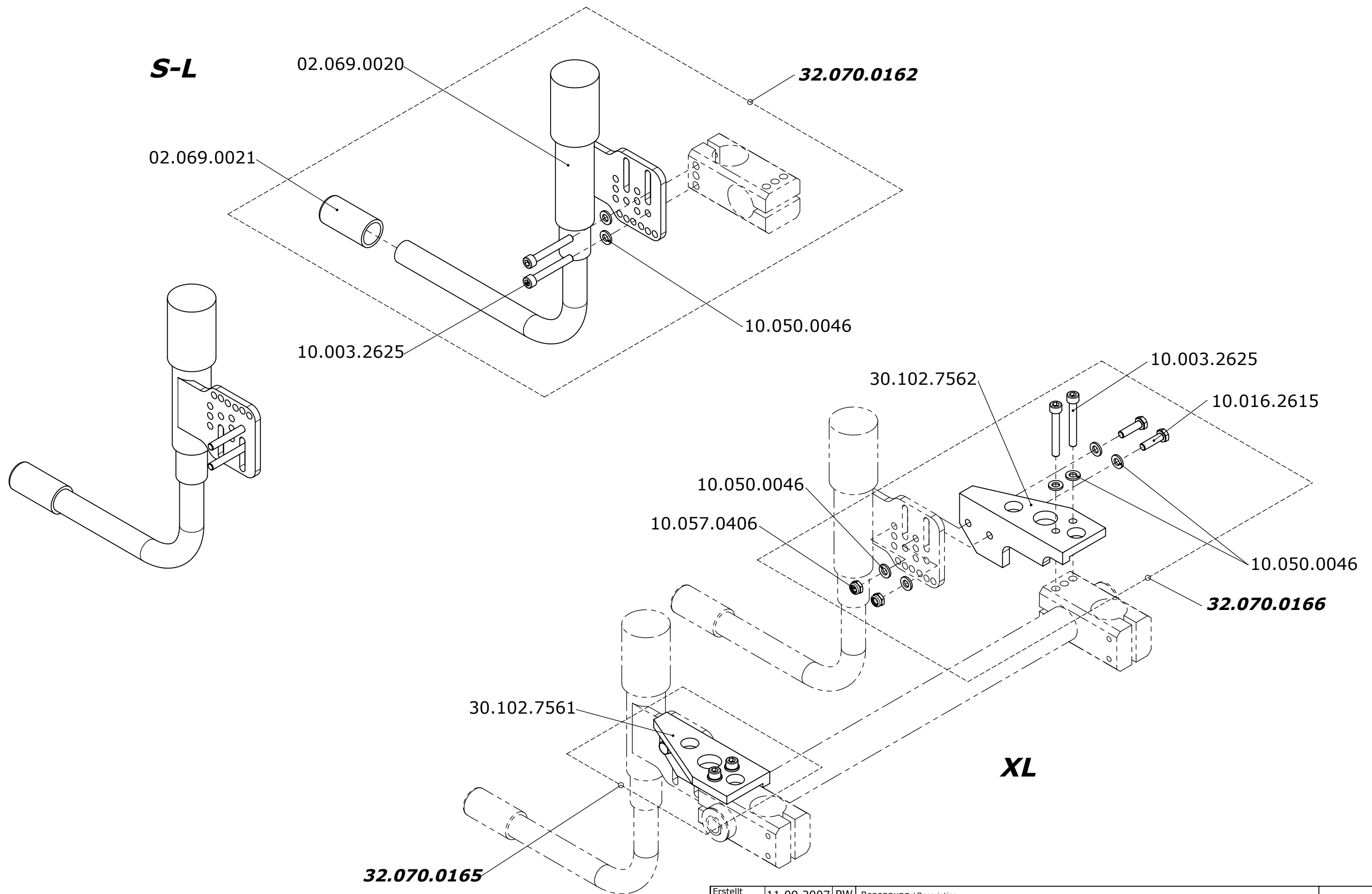


Erstellt <i>Prepared</i>	11.09.2007	PW	Benennung / Description Kipphilfe schwenkbar "HC" Tip aid swing away "HC"		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN	Artikelnummer Art. no. 50.069.5720		Index / Rev.
Status <i>Status</i>					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair LAE	

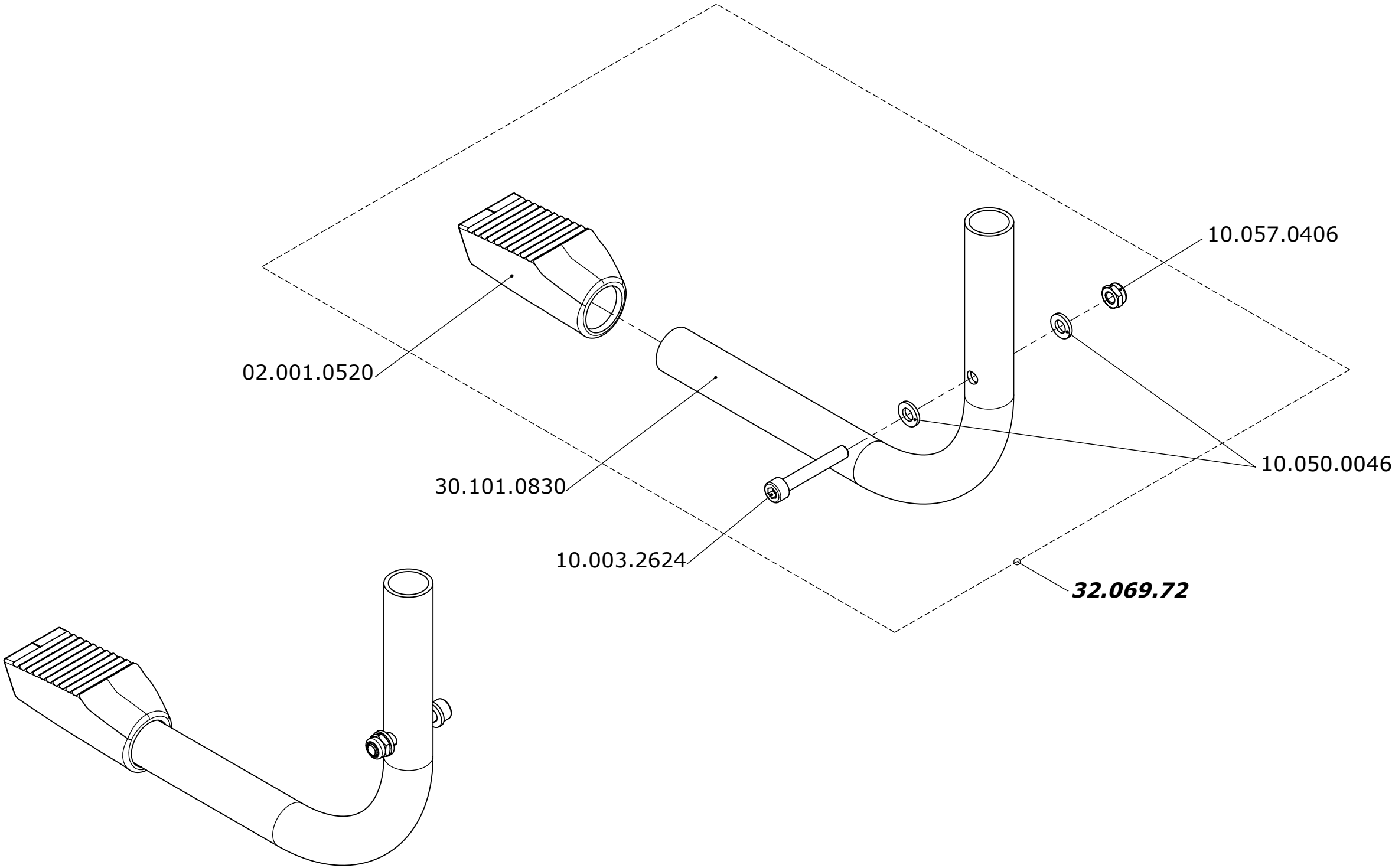


Erstellt <i>Prepared</i>	11.09.2007	PW	Benennung / Description Kipphilfe Tip aid		Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
LEVO  LEVO AG THE EXPERTS IN STANDING CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.5730	

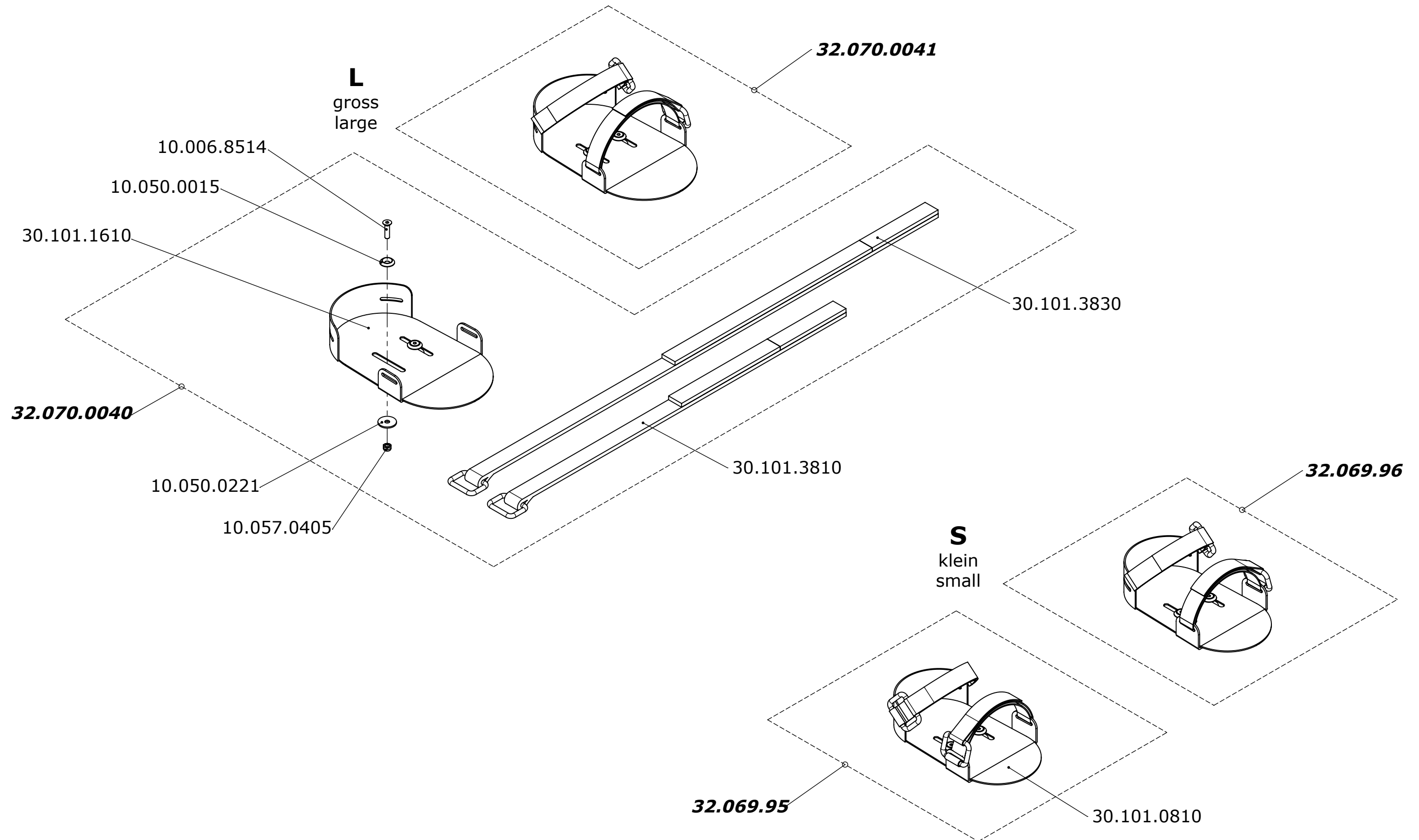


Erstellt Prepared	10.09.2007	PW	Benennung / Description Fussführung Foot guide		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	PW	Rollstuhl Wheelchair LAE		Artikelnummer Art. no. 50.069.5800
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch		

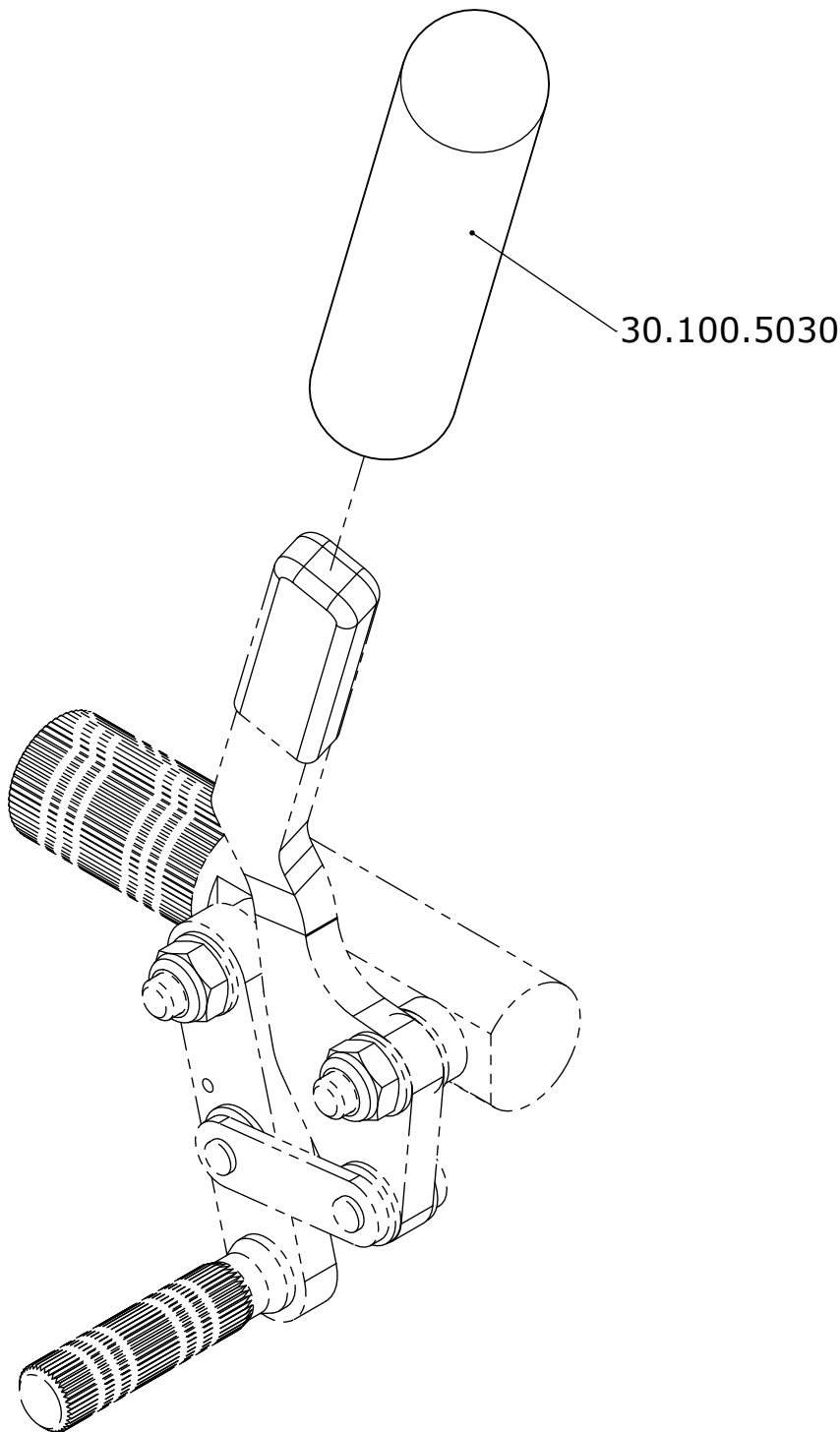

Erstellt <i>Prepared</i>	10.09.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Bremshebelverlängerung Brake lever extension		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i>
			LAE	50.069.5900	1 / 1 Index / Rev.

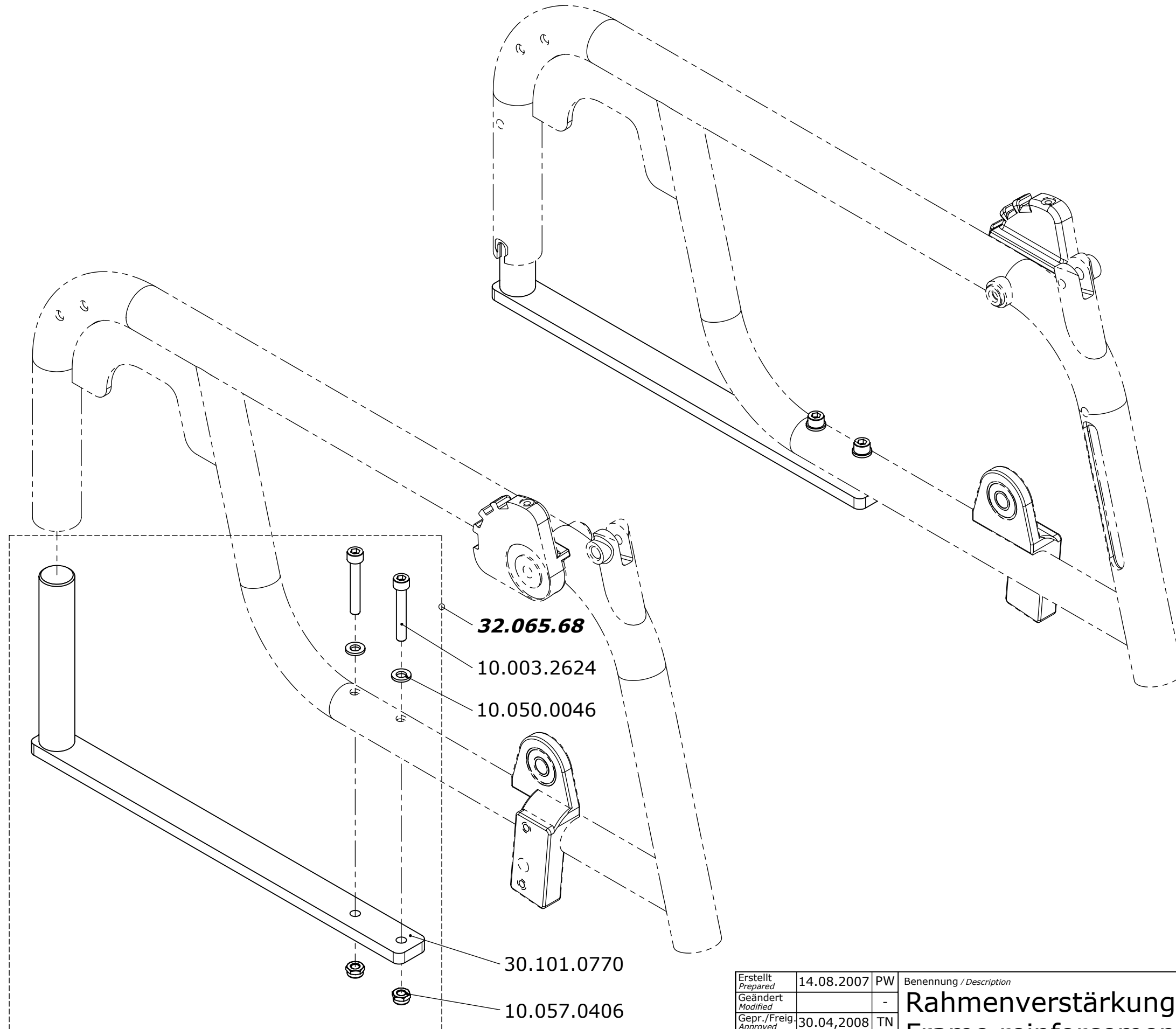


Erstellt Prepared	14.08.2007	PW	Benennung / Description Rahmenverstärkung für e-fix Frame reinforcement for e-fix		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved	30.04,2008	TN			
Status					
LEVO  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair LAE	Artikelnummer Art. no. 50.069.6000	

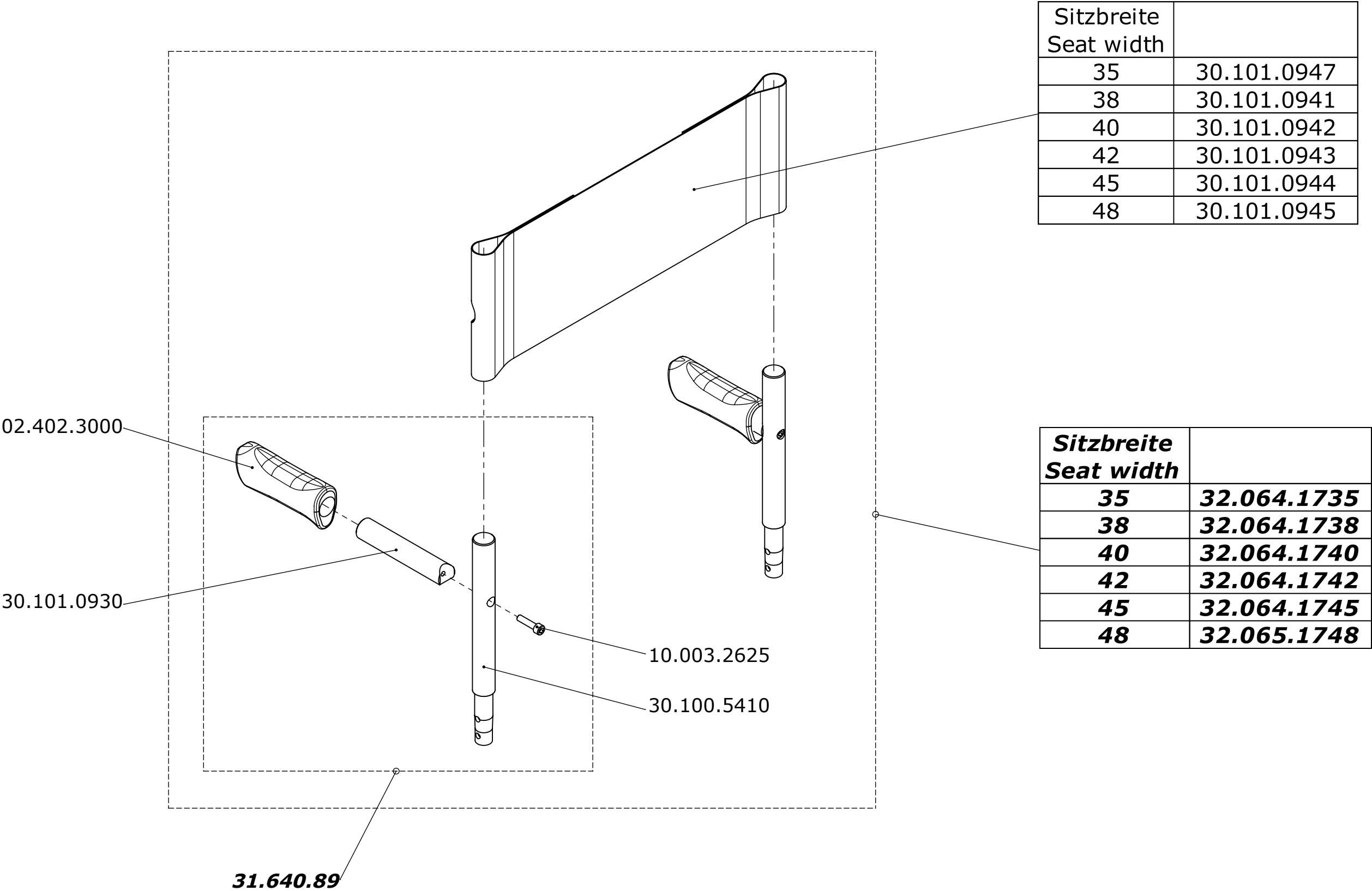

Erstellt <i>Prepared</i>	30.08.2007	PW	Benennung / Description Rückensysteme Backrest systems		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LAE	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.069.6200

* nicht im Lieferumfang
not included in our shipment

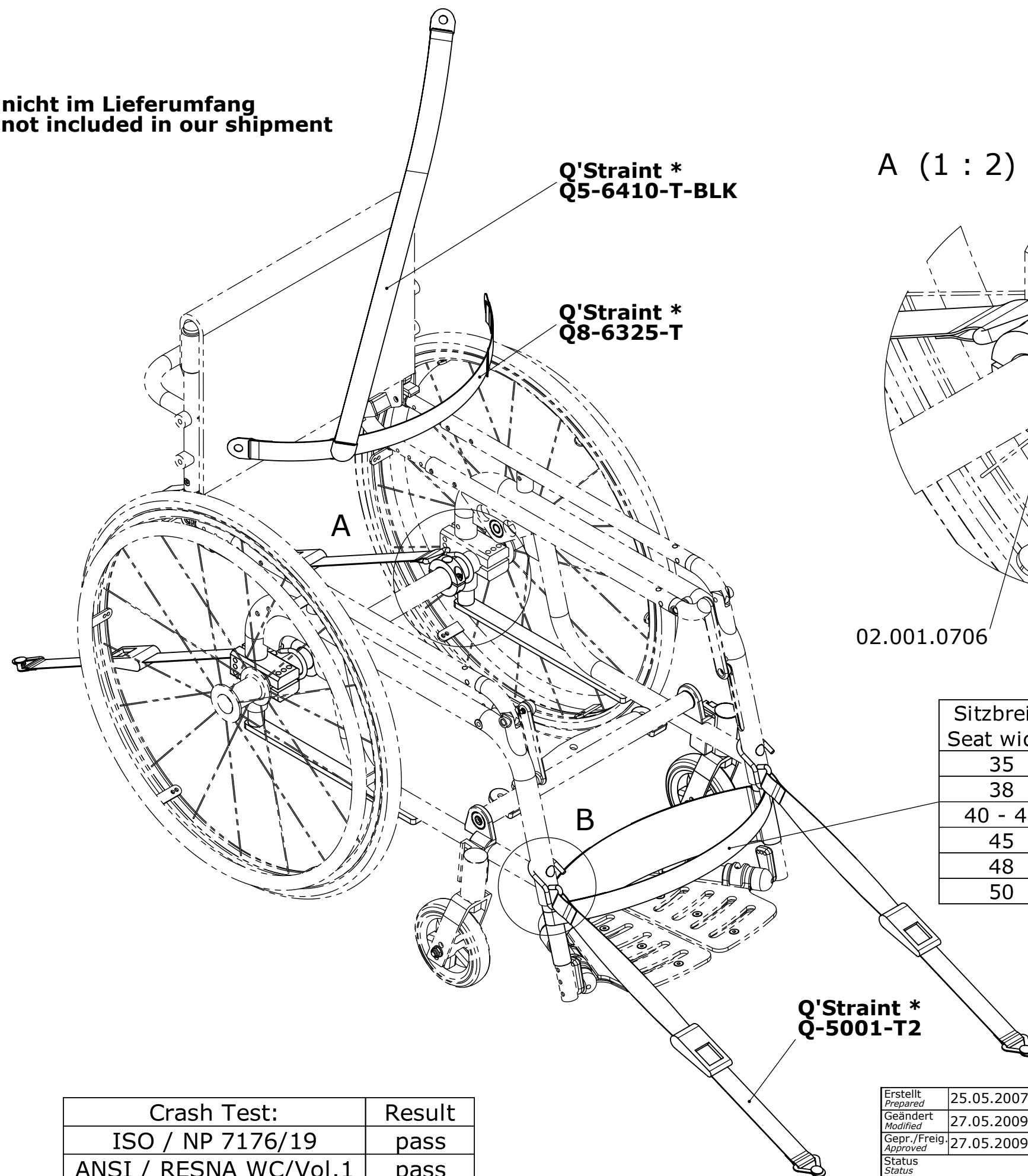


Sitzbreite Seat width	Artikelnummer Article-no.
35	30.100.7701
38	30.100.7702
40 - 42	30.100.7703
45	30.100.7704
48	30.100.7705
50	30.100.7706

Set Transporthalterung Tiedown-Set	
Sitzbreite Seat	Artikelnummer Article-no.
35	32.070.0501
38	32.070.0502
40 - 42	32.070.0503
45	32.070.0504
48	32.070.0505
50	32.070.0506

Crash Test:	Result
ISO / NP 7176/19	pass
ANSI / RESNA WC/Vol.1	pass

Erstellt <i>Prepared</i>	25.05.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Set Transporthalterung Tiedown-Set			
Geändert <i>Modified</i>	27.05.2009	PW				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	27.05.2009	TN				
Status <i>Status</i>						
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> A	
			LAE	50.069.6300		

Stuhlbreite / Seat width	Artikelnummer / Article no.
35	30.103.1221
38	30.103.1222
40	30.103.1223
42	30.103.1224
45	30.103.1225
48	30.103.1226

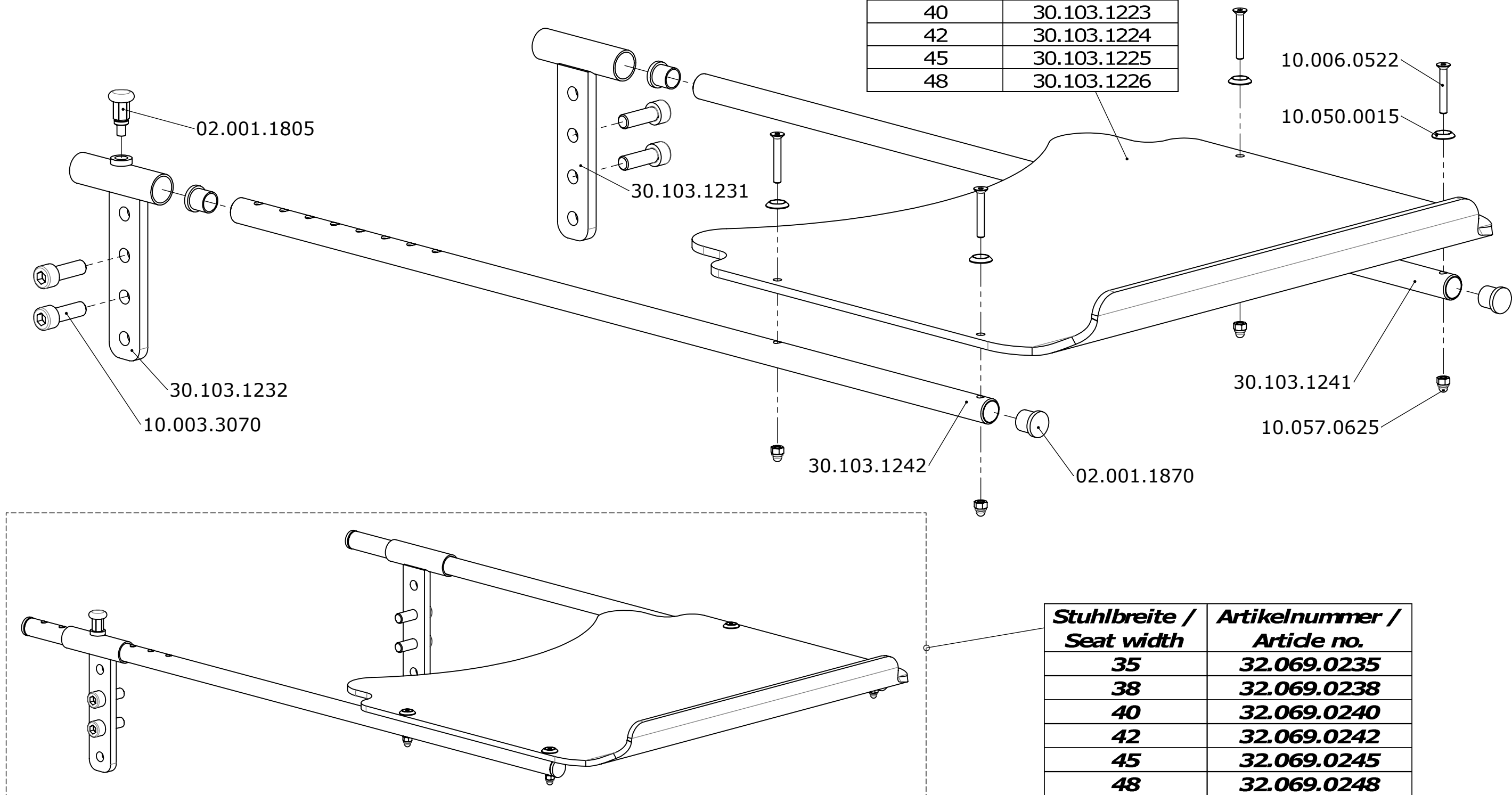

Stuhlbreite / Seat width	Artikelnummer / Article no.
35	32.069.0235
38	32.069.0238
40	32.069.0240
42	32.069.0242
45	32.069.0245
48	32.069.0248

Bei Nachbestellung muss das Set „Rückenteile zu Anstecktisch“ (50.069.6500) mitbestellt werden.
In case of upgrade, the set "backrest parts for table tray" (50.069.6500) is required too.

Erstellt Prepared	29.11.2010	PW
Geändert Modified	31.01.2013	PW
Gepr./Freig. Approved	31.01.2013	FW
Status Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Anstecktisch
Table tray

LEVO ⁺
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch


Rollstuhl
Wheelchair

LAE

Artikelnummer
Art. no.

50.069.6400

Blatt / Anz.
Sheet / no. of
1 / 1
Index / Rev.
A

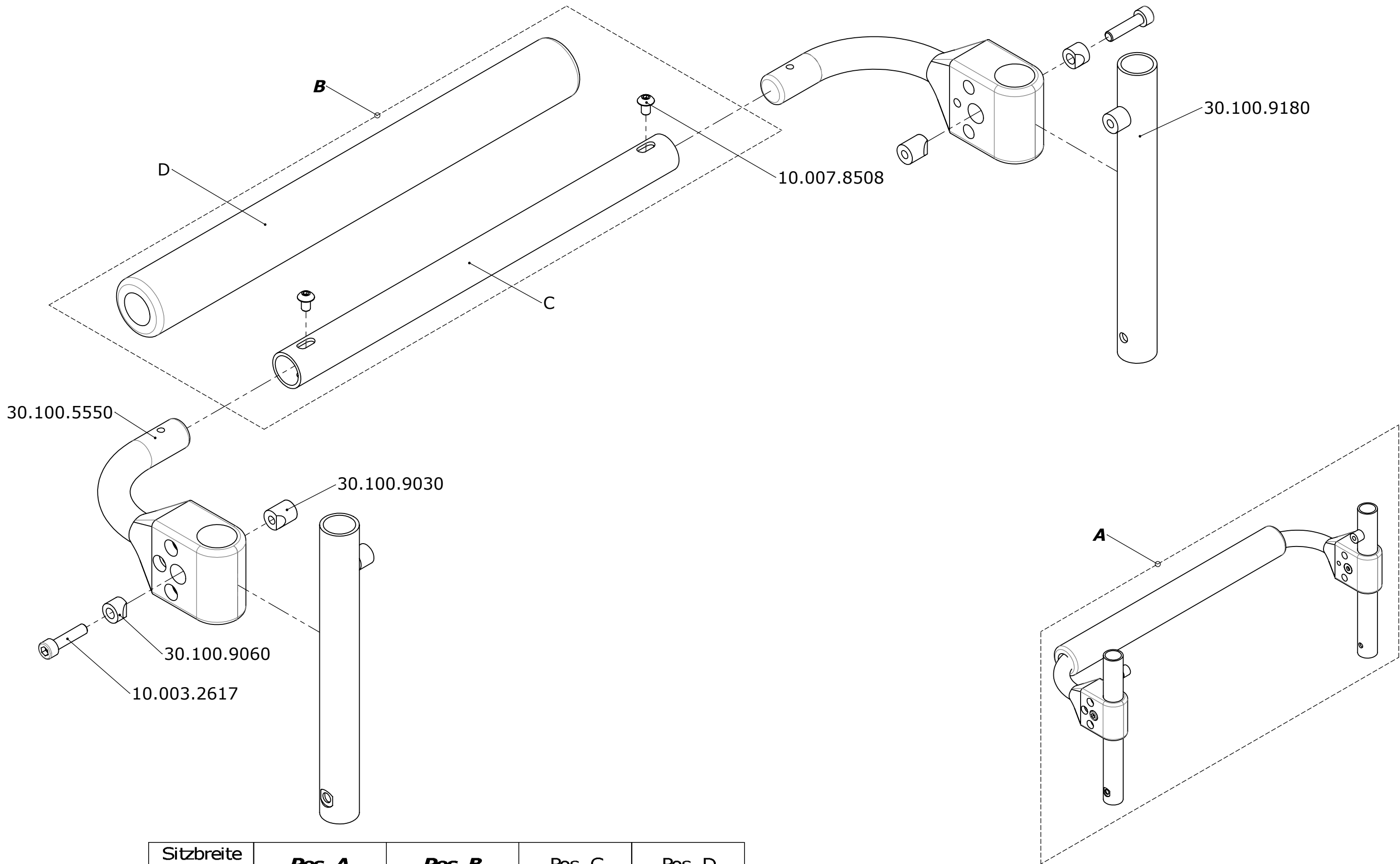

Sitzbreite Seat width	Pos. A	Pos. B	Pos. C	Pos. D
35	32.069.0335	32.070.0039	30.100.9142	30.101.5173
38	32.069.0338	32.070.0030	30.100.9143	
40	32.069.0340	32.070.0031	30.100.9144	30.101.4110
42	32.069.0342	32.070.0032	30.100.9145	
45	32.069.0345	32.070.0033	30.100.9146	30.101.5172
48	32.069.0348	32.070.0034	30.100.9147	

Erstellt <i>Prepared</i>	30.01.2013	PW	Benennung / <i>Description</i> Rückenteile zu Anstecktisch Backrest parts for table tray		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.01.2013	FW			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch LAE			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> -