
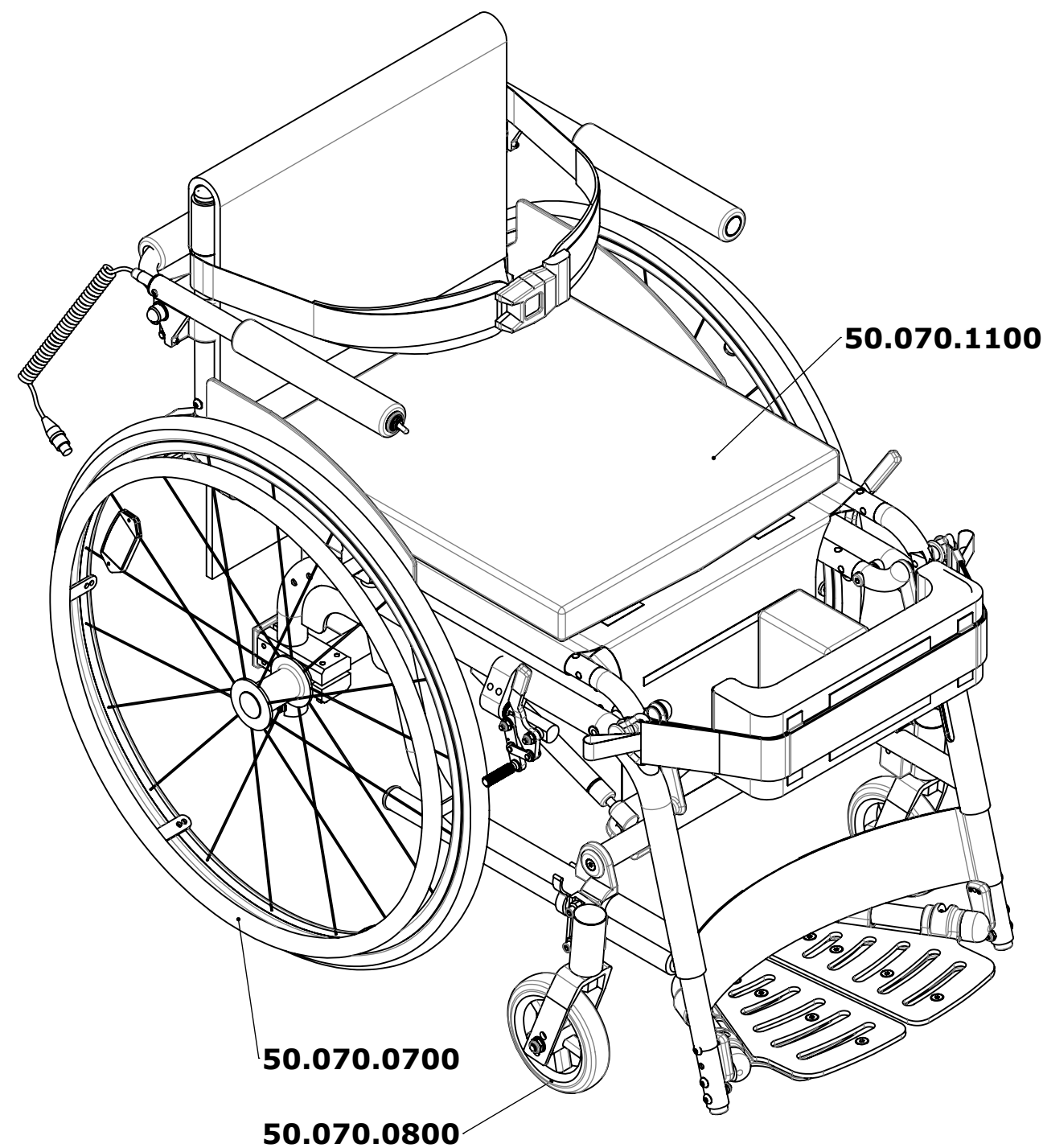


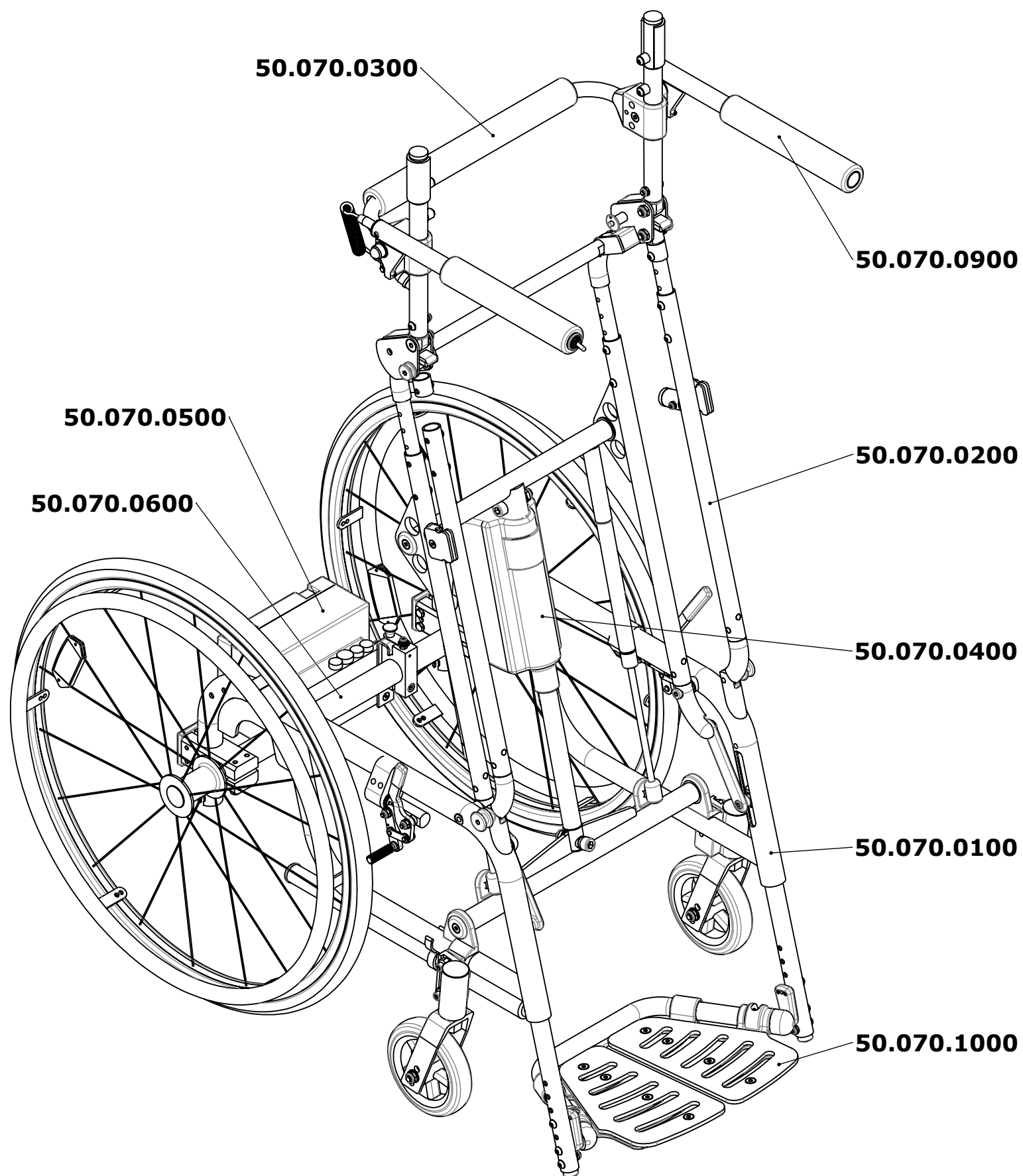

Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / <i>Description</i> LCEV		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i>
			LCEV	50.070.0000	1 / 1 Index / <i>Rev.</i> -

Farbe	color	rechts/right	links/left
platin	platinum	32.065.20	32.065.21
blau	blue	32.065.2010	32.065.2110
gelb	yellow	32.065.2020	32.065.2120
rot	red	32.065.2030	32.065.2130
schwarz	black	32.065.2050	32.065.2150
Reflexfarbe	reflex color	32.065.2040	32.065.2140
rot metallic	red metallic	32.065.2060	32.065.2160
blau metallic	blue metallic	32.065.2070	32.065.2170
grün metallic	green metallic	32.065.2080	32.065.2180
silber metallic	silver metallic	32.065.2090	32.065.2190
Aluminium poliert	aluminum polished	32.065.2005	32.065.2105
RAL	RAL	32.065.2095	32.065.2195

32.065.23

02.001.0212

links/left

rechts/right

02.001.0220


02.001.0213

32.065.22

30.100.5140

Farbe	color	rechts/right	links/left
platin	platinum	31.650.02	31.650.01
blau	blue	31.650.0201	31.650.0101
gelb	yellow	31.650.0202	31.650.0102
rot	red	31.650.0203	31.650.0103
schwarz	black	31.650.0205	31.650.0105
Reflexfarbe	reflex color	31.650.0204	31.650.0104
rot metallic	red metallic	31.650.0206	31.650.0106
blau metallic	blue metallic	31.650.0207	31.650.0107
grün metallic	green metallic	31.650.0208	31.650.0108
silber metallic	silver metallic	31.650.0209	31.650.0109
Aluminium poliert	aluminum polished	31.650.0210	31.650.0110
RAL	RAL	31.650.0211	31.650.0111

Erstellt <i>Prepared</i>	27.06.2007	MT	Benennung / <i>Description</i>		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN	Grundrahmen Basic frame		
Status <i>Status</i>					
LEVO[®].d THE EXPERTS IN STANDING			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.0100	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i>

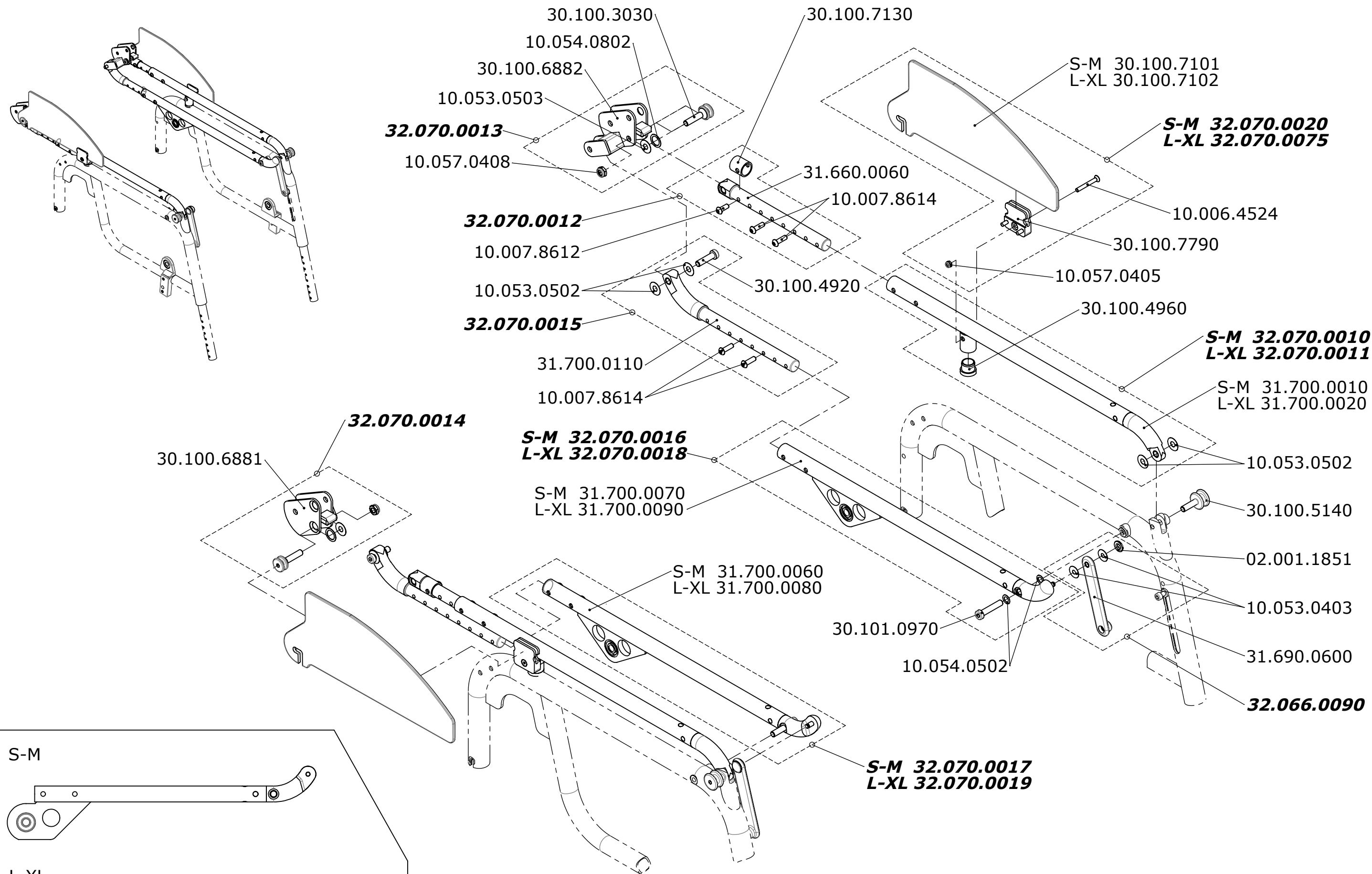

S-M

L-XL

Erstellt Prepared	17.08.2007	MT
Geändert Modified	10.03.2010	PW
Gepr./Freig. Approved	10.03.2010	TN
Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Sitzträger
Seat support

LEVO 
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch

Rollstuhl
Wheelchair


LCEV

Artikelnummer
Art. no.

50.070.0200

Blatt / Anz.
Sheet / no. of
1 / 1
Index / Rev.
A

Sitzbreite Seat width	Pos. A	Pos. B	Pos. C
35	32.070.0039	30.100.9142	30.101.5173
38	32.070.0030	30.100.9143	
40	32.070.0031	30.100.9144	30.101.4110
42	32.070.0032	30.100.9145	
45	32.070.0033	30.100.9146	30.101.5172
48	32.070.0034	30.100.9147	
50	32.070.0049	30.100.9149	02.400.6000

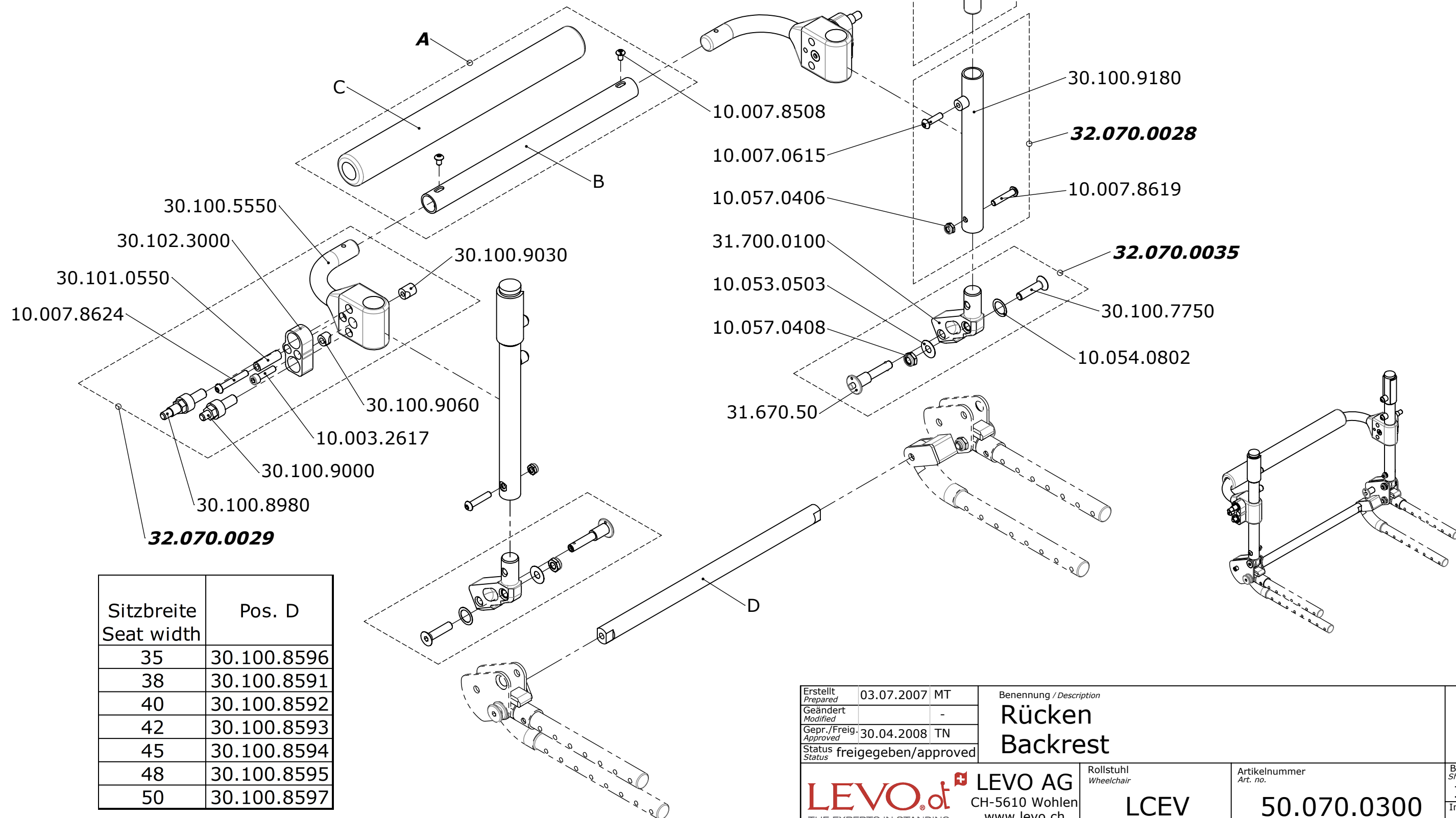

Erstellt <i>Prepared</i>	03.07.2007	MT	Benennung / <i>Description</i>		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN	Rücken Backrest		
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i>
			LCEV	50.070.0300	1 / 1 Index / Rev. -

Sitzbreite Seat width	
35	30.102.1480
38	30.101.1400
40	30.101.1430
42	30.101.1460
45	30.101.1480
48	30.101.1490
50	30.102.1460


Sitzbreite Seat width	
35	32.065.4095
38	32.065.41
40	32.065.42
42	32.065.43
45	32.065.44
48	32.065.45
50	32.065.4505

Grösse Size	Kraft Force	Artikelnummer Article no.
S - M	400 N	02.001.0616
L - XL	700 N	02.001.0617


Sitzbreite Seat width	
35	32.065.4695
38	32.065.47
40	32.065.48
42	32.065.49
45	32.065.50
48	32.065.51
50	32.065.5105

Sitzbreite Seat width	
35	30.102.1430
38	30.100.3380
40	30.100.3370
42	30.100.3350
45	30.100.3340
48	30.100.3330
50	30.102.1440


Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / <i>Description</i> Aufsteheinheit Stand up unit		
Geändert <i>Modified</i>	08.02.2017	PW			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	08.02.2017	FW			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch 			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.0400	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> A

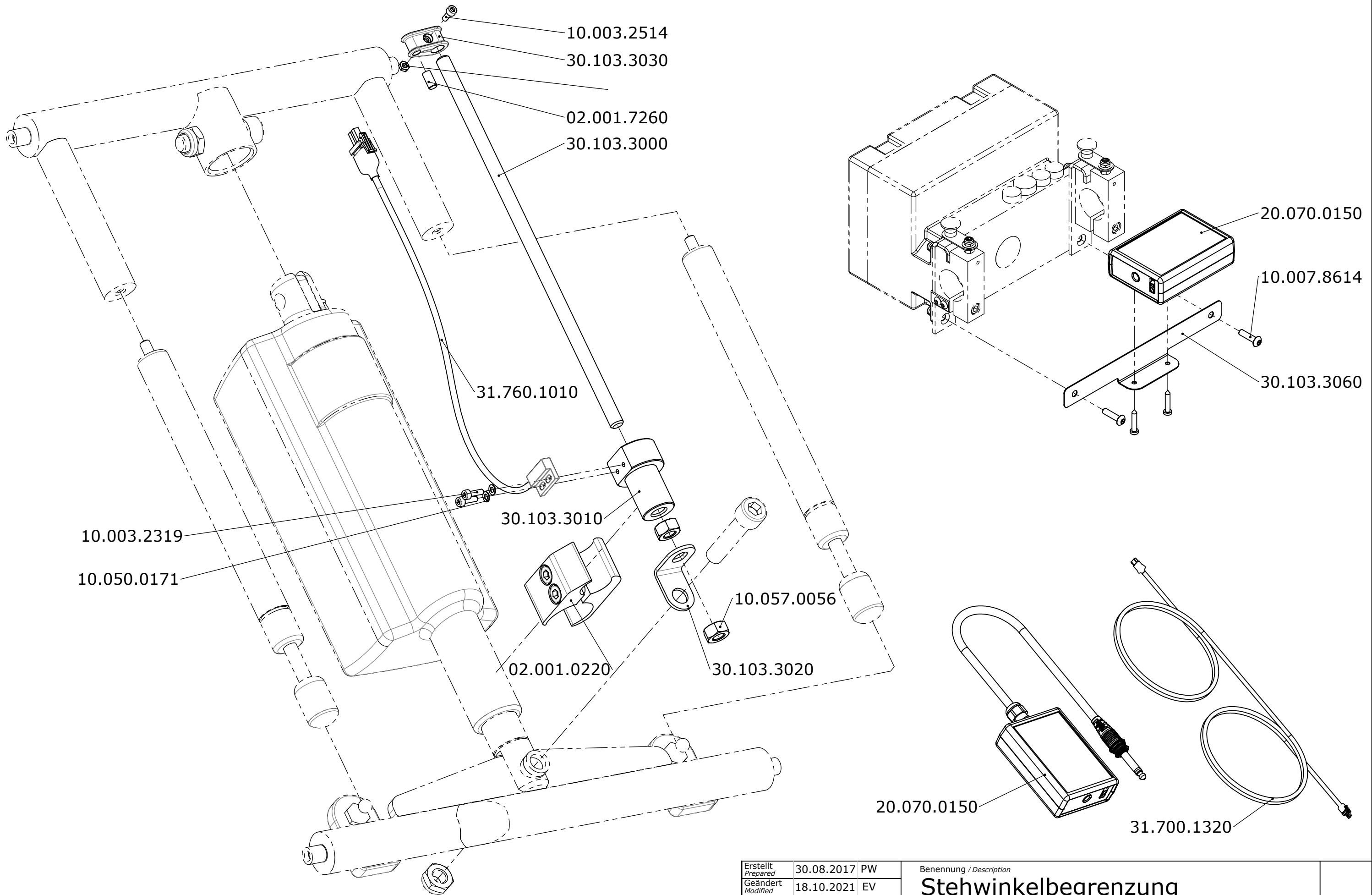



Erstellt <i>Prepared</i>	30.08.2017	PW	Benennung / <i>Description</i> Stehwinkelbegrenzung Standing angle limit		Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> A
Geändert <i>Modified</i>	18.10.2021	EV			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	18.10.2021	EV			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.0450	

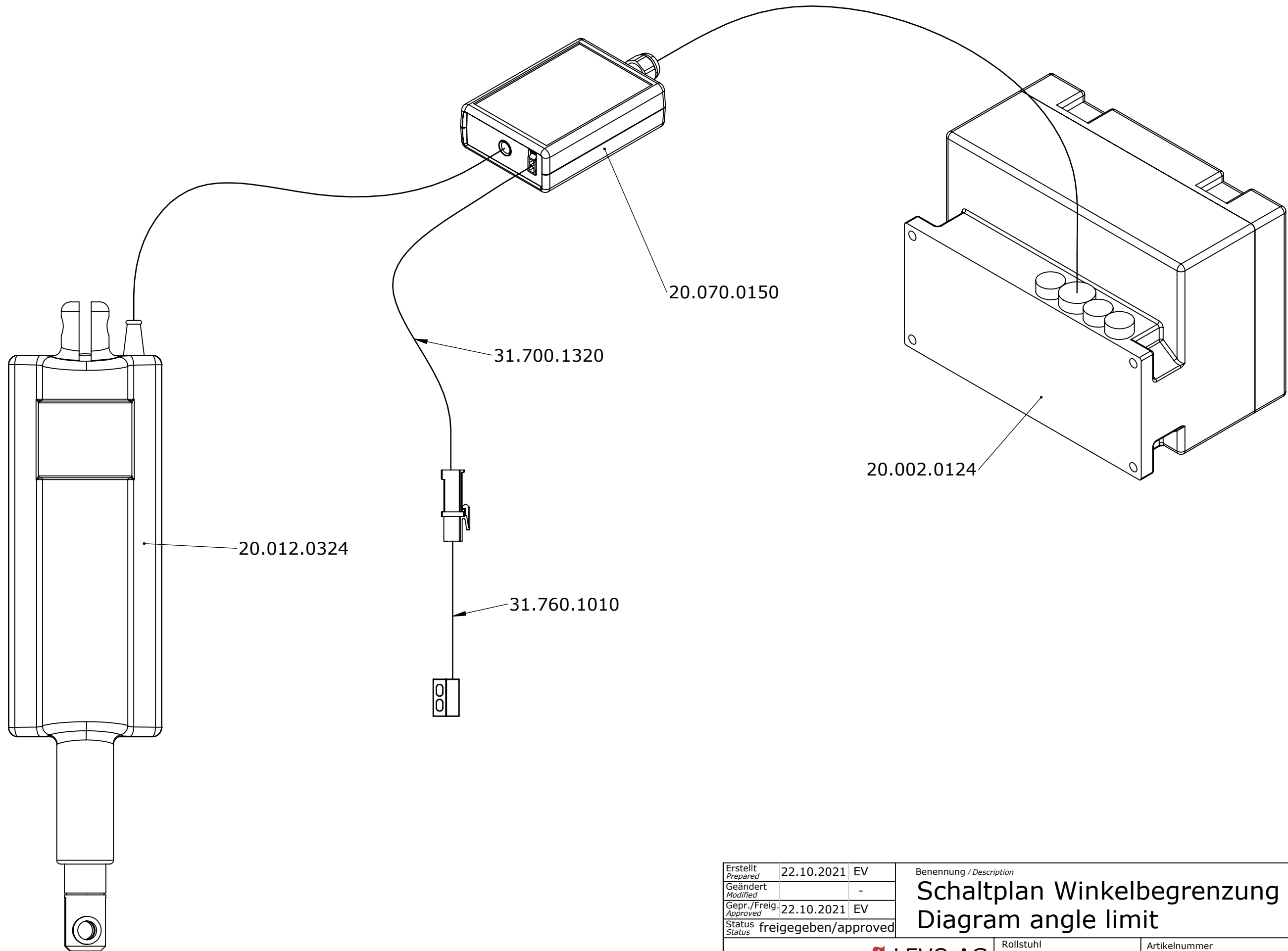

Erstellt <i>Prepared</i>	22.10.2021	EV	Benennung / <i>Description</i> Schaltplan Winkelbegrenzung Diagram angle limit		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	22.10.2021	EV			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
LEVO^{dt} THE EXPERTS IN STANDING LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.0470	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> -

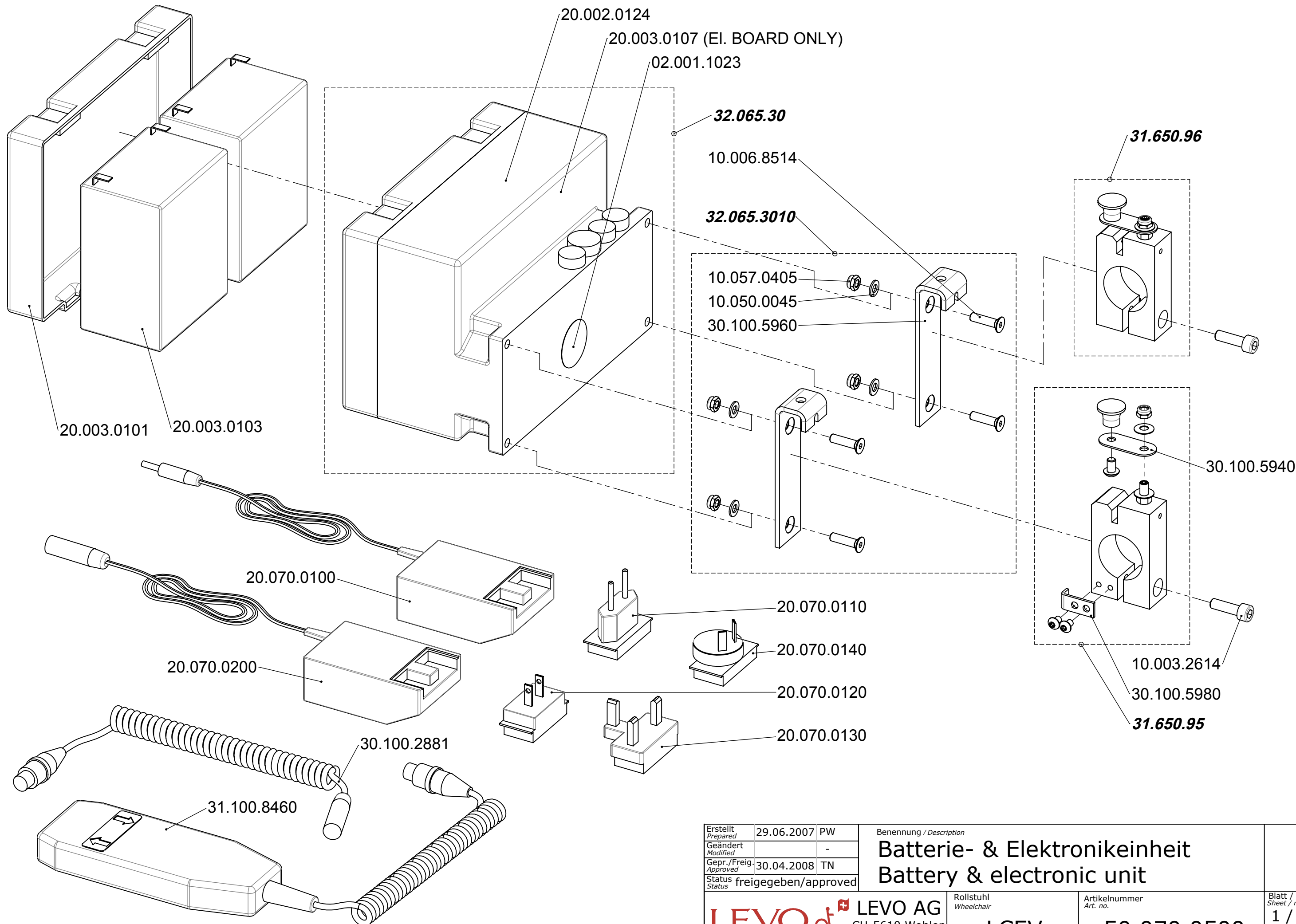

Erstellt <i>Prepared</i>	29.06.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Batterie- & Elektronikeinheit Battery & electronic unit		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch 			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i>
			LCEV	50.070.0500	

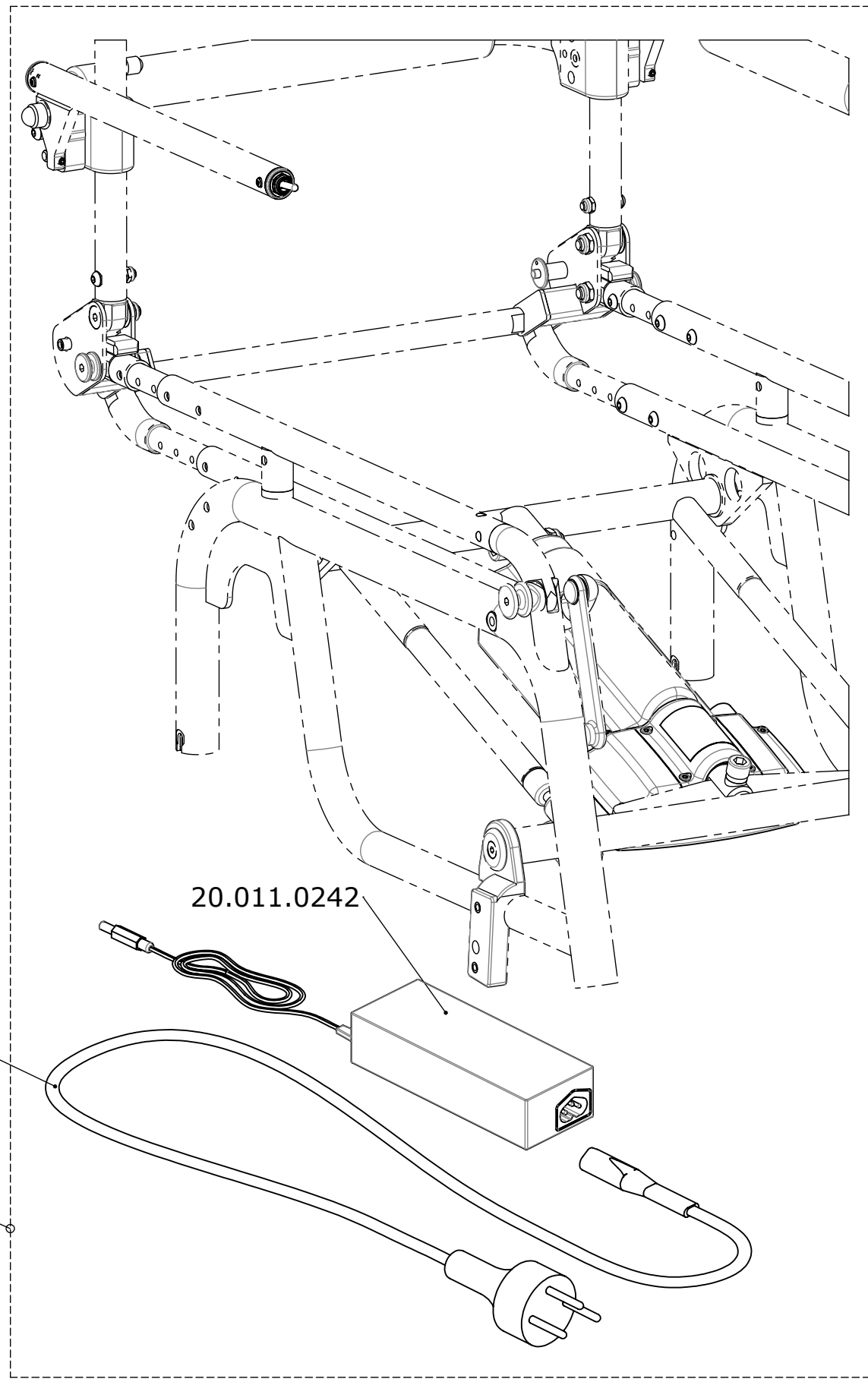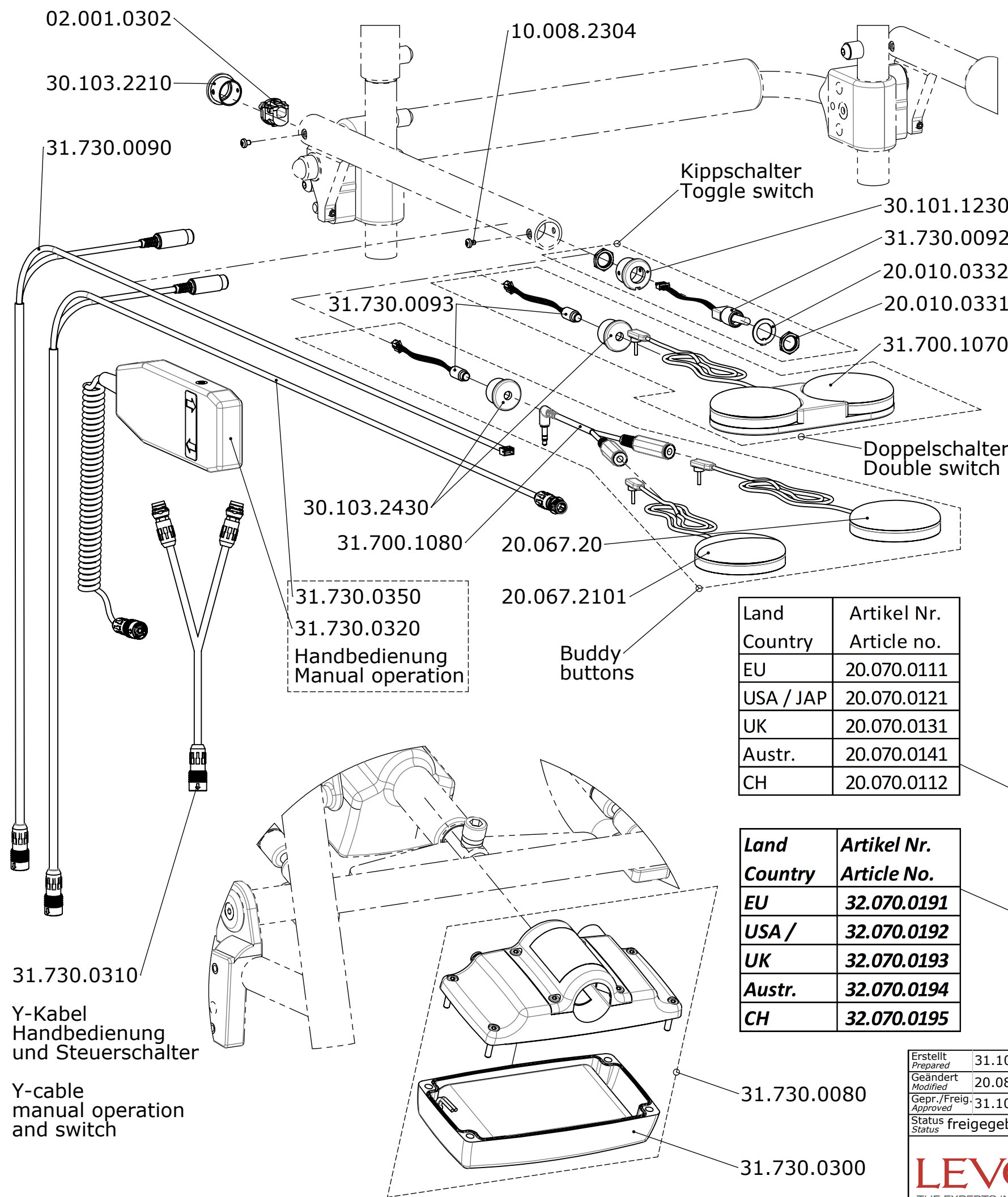

Land Country	Artikel Nr. Article no.
EU	20.070.0111
USA / JAP	20.070.0121
UK	20.070.0131
Austr.	20.070.0141
CH	20.070.0112

Land Country	Artikel Nr. Article No.
EU	32.070.0191
USA /	32.070.0192
UK	32.070.0193
Austr.	32.070.0194
CH	32.070.0195

Erstellt Prepared	31.10.2017	PW
Geändert Modified	20.08.2019	LL
Gepr./Freig. Approved	31.10.2017	PW
Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description
Gewichts reduktions Kit
Weight reduction Kit


LEVO ⁺
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch

Rollstuhl
Wheelchair
LCEV


Artikelnummer
Art. no.
50.070.0550

Blatt / Anz.
Sheet / no. of
1 / 1
Index / Rev.
A

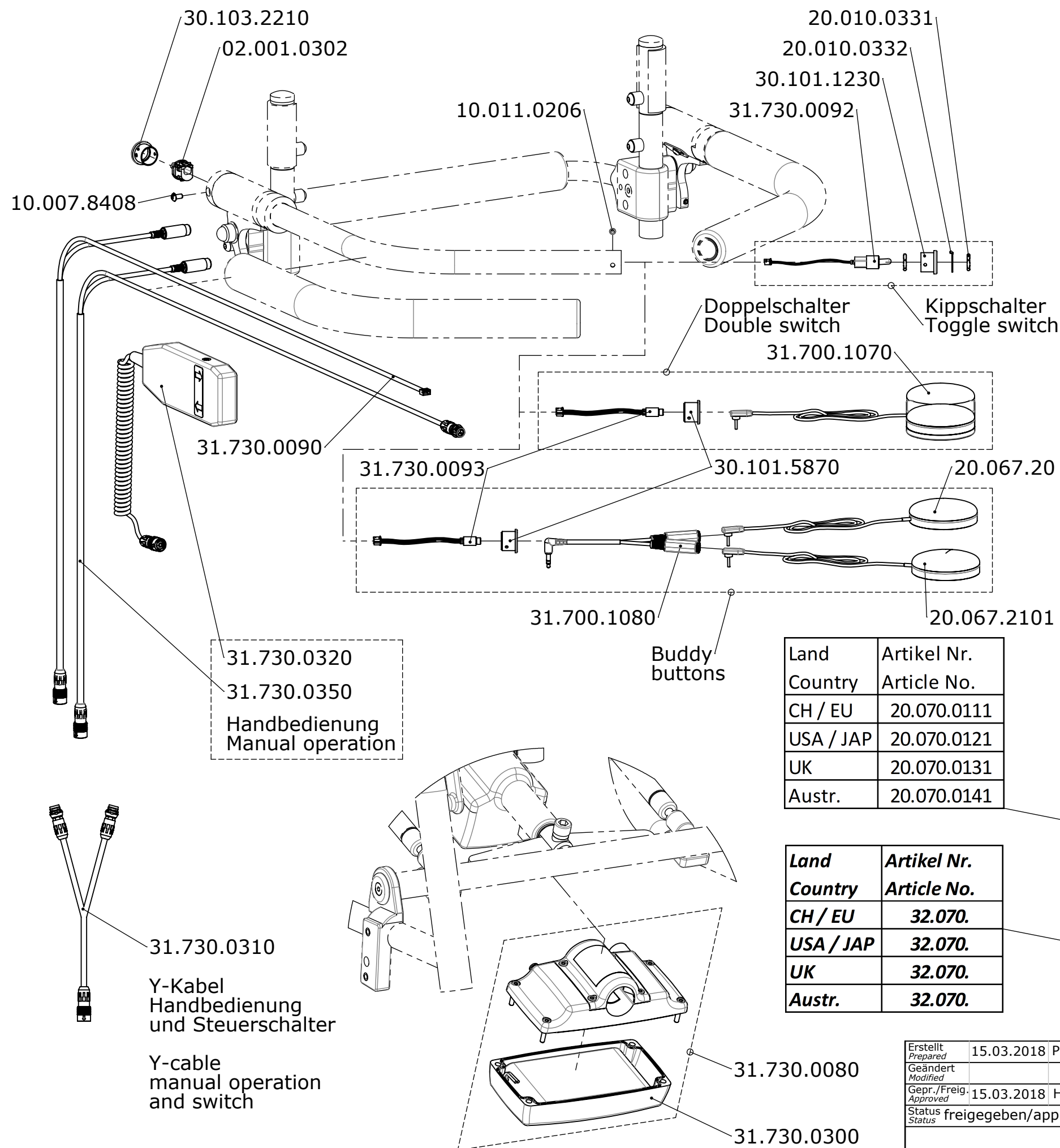

Land Country	Artikel Nr. Article No.
CH / EU	20.070.0111
USA / JAP	20.070.0121
UK	20.070.0131
Austr.	20.070.0141

Land Country	Artikel Nr. Article No.
CH / EU	32.070.
USA / JAP	32.070.
UK	32.070.
Austr.	32.070.

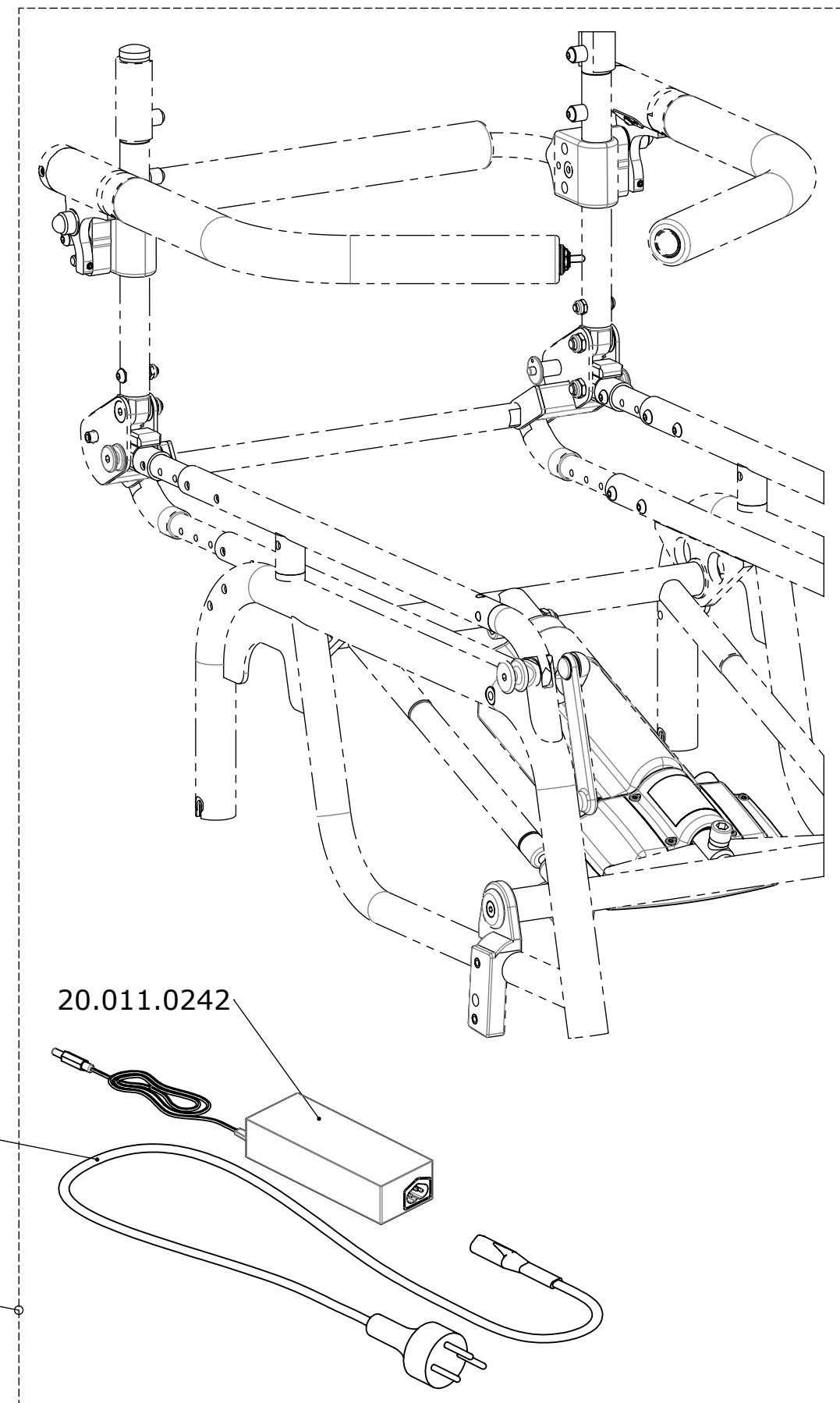

Erstellt Prepared	15.03.2018	PW
Geändert Modified		
Gepr./Freig. Approved	15.03.2018	HB
Status Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Light Option Oberkörperbügel
Light weight option swing away

LEVO ^{dt}
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch

Rollstuhl
Wheelchair


LCEV

Artikelnummer
Art. no.


50.070.0560

Blatt / Anz.
Sheet / no. of
1 / 1
Index / Rev.
-


S

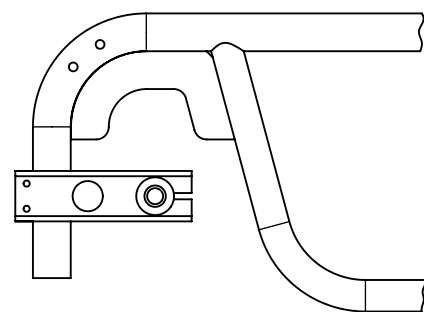


M

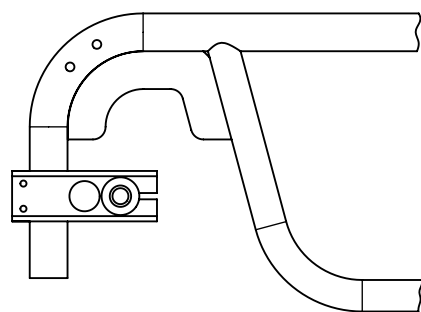

L

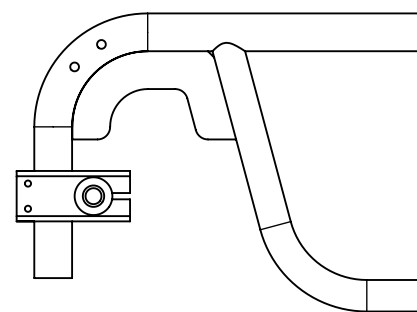

XL

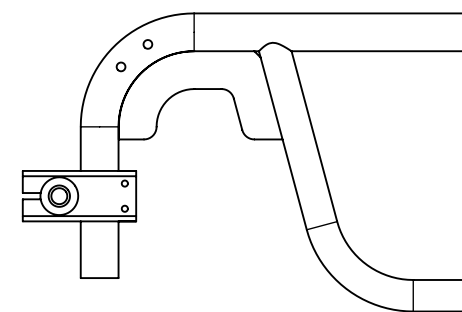

Grösse Size	
S	30.100.5380
M	30.100.5400
L/XL	30.100.5360

02.001.1710

10.020.2614

10.050.0046

10.016.2624

Standard

3°


6°

Grösse Size	
S	32.064.0130
M	32.064.0131
L/XL	32.064.0132

Sitzbreite Seat width	Standard	Radsturz 3° Camber 3°	Radsturz 6° Camber 6°
35	31.700.0300	31.700.0370	31.700.0440
38	31.700.0310	31.700.0380	31.700.0450
40	31.700.0320	31.700.0390	31.700.0460
42	31.700.0330	31.700.0400	31.700.0470
45	31.700.0340	31.700.0410	31.700.0480
48	31.700.0350	31.700.0420	31.700.0490
50	31.700.0360	31.700.0430	31.700.0500


Erstellt Prepared	17.08.2007	MT	Benennung / Description Hinterradachse Rear wheel axle		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	TN	LCEV		Artikelnummer Art. no. 50.070.0600
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch		
			Rollstuhl Wheelchair		

Standard

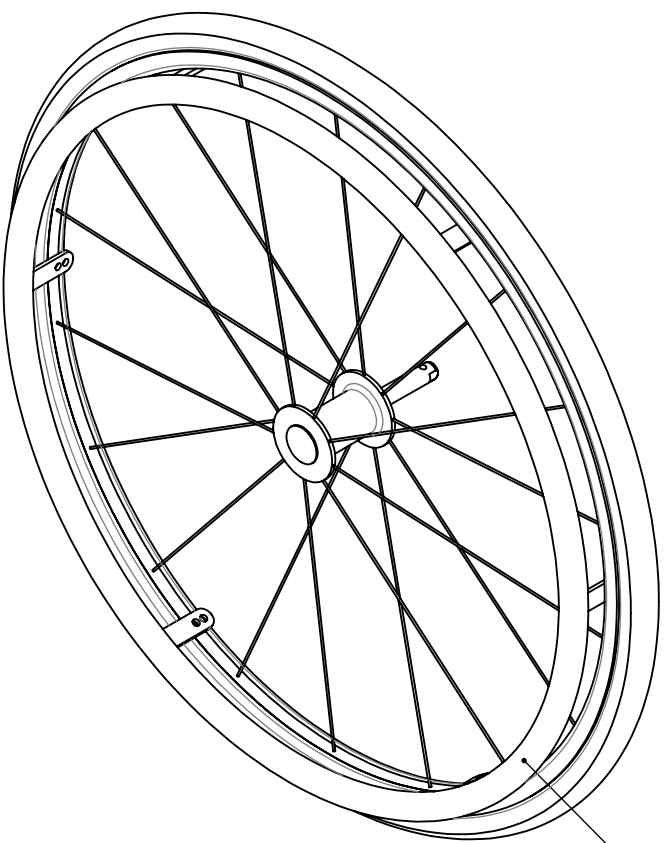


50.070.0710

Spinergy

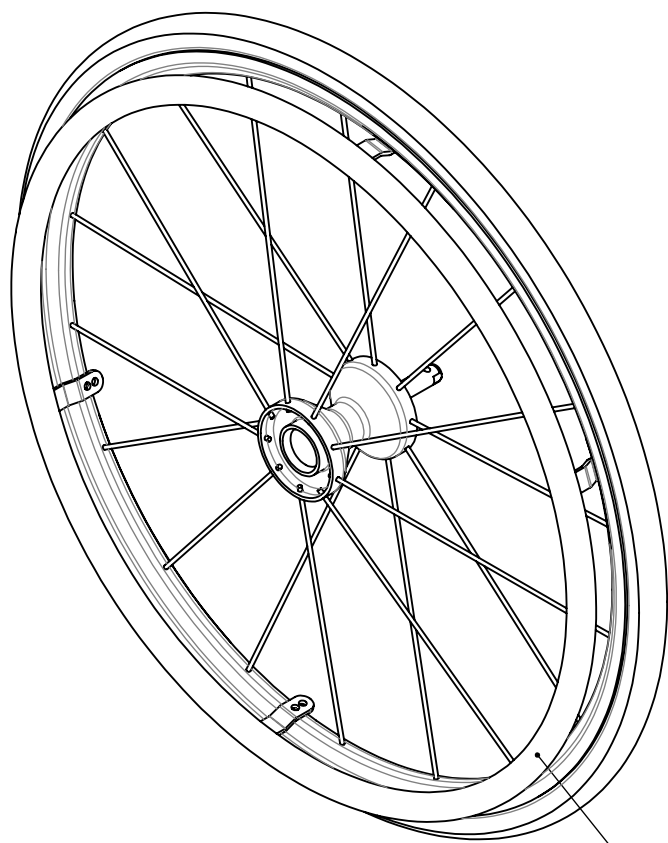


50.070.0720

mit Naben-Feststellbremse
with hub locking brake

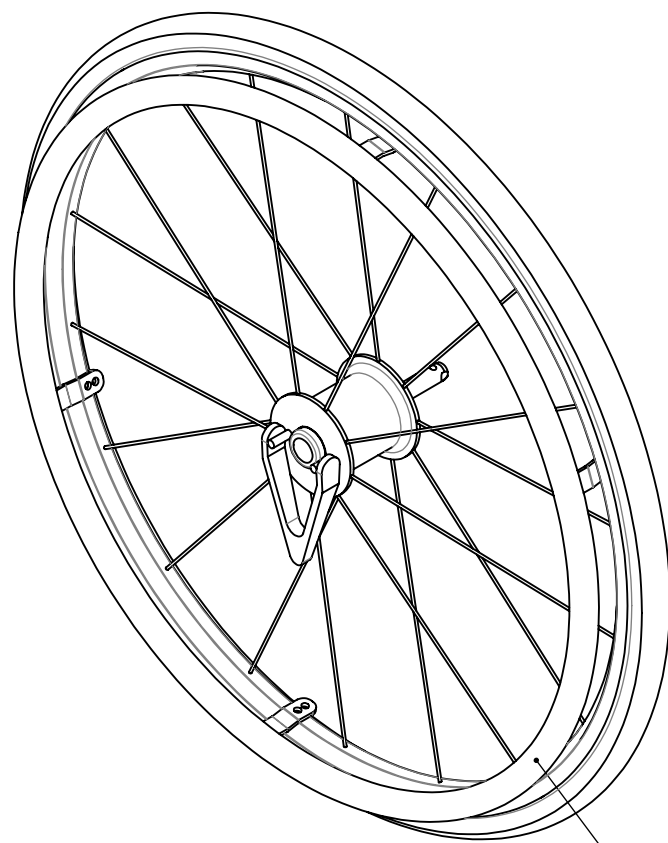

50.070.0730

Luftpumpe
Air pump

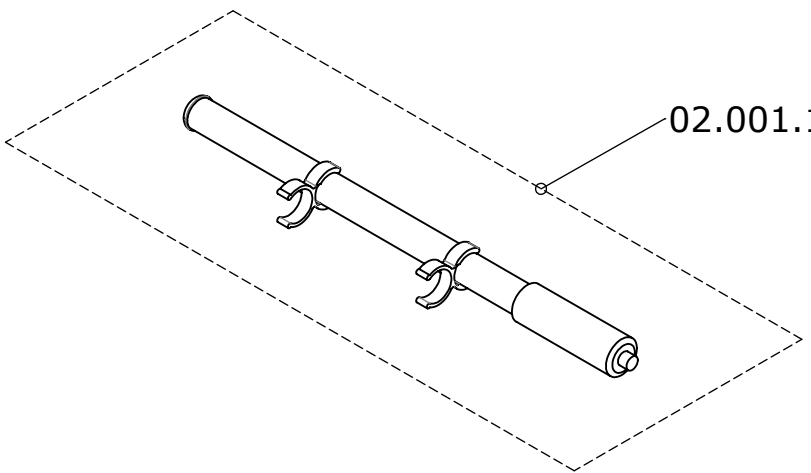


02.001.1121

<table><tr><td>Erstellt <i>Prepared</i></td><td>11.09.2007</td><td>PW</td></tr><tr><td>Geändert <i>Modified</i></td><td>29.03.2017</td><td>PW</td></tr><tr><td>Gepr./Freig. <i>Approved</i></td><td>29.03.2017</td><td>FW</td></tr><tr><td>Status <i>Status</i></td><td colspan="2">freigegeben/approved</td></tr></table>			Erstellt <i>Prepared</i>	11.09.2007	PW	Geändert <i>Modified</i>	29.03.2017	PW	Gepr./Freig. <i>Approved</i>	29.03.2017	FW	Status <i>Status</i>	freigegeben/approved		Benennung / <i>Description</i> Hinterräder Rear wheels		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev. A
Erstellt <i>Prepared</i>	11.09.2007	PW															
Geändert <i>Modified</i>	29.03.2017	PW															
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	29.03.2017	FW															
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved																
LEVO[®]_{dt} THE EXPERTS IN STANDING LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.0700													

02.400.1000

02.400.5002

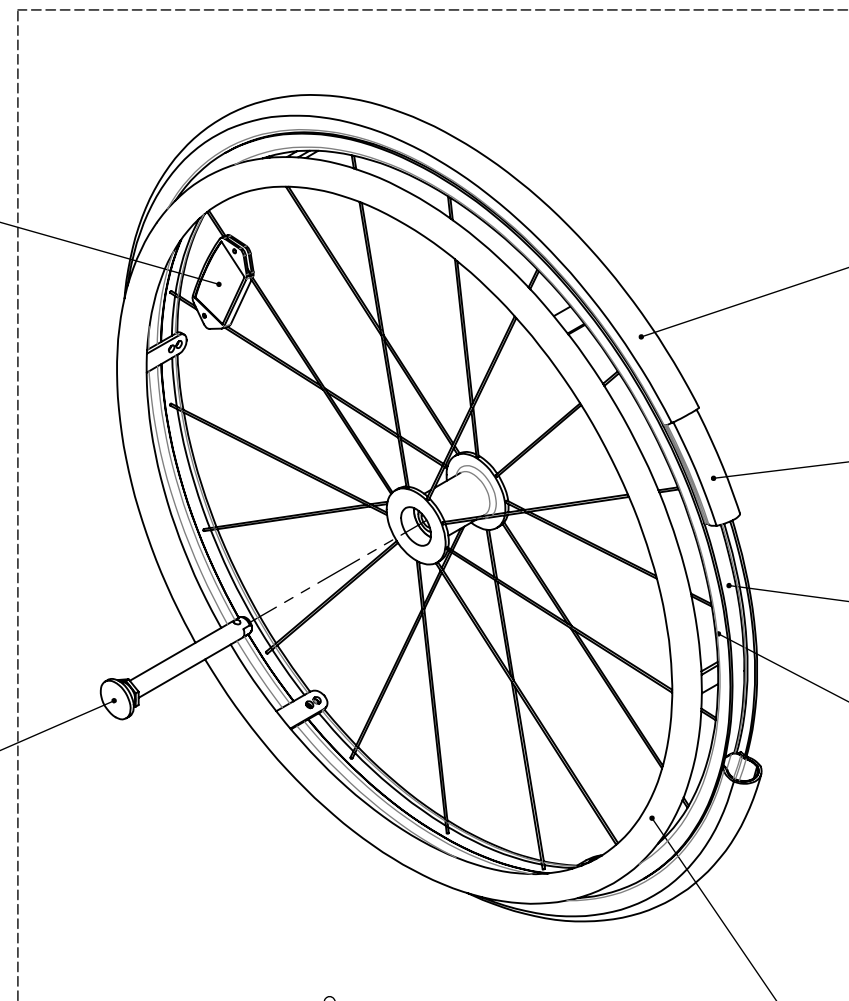

	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	02.400.2212	02.400.2322
24"	02.400.2425	02.400.2324
26"	02.400.2627	02.400.2326

22"	02.400.2215
24"	02.400.2426
26"	02.400.2628


22"	02.400.2216
24"	02.400.2427
26"	02.400.2630

22"	02.400.2213
24"	02.400.2423
26"	02.400.2623

22"	02.400.2200
24"	02.400.2400
26"	02.400.2600


	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	32.070.0200	32.070.0230
24"	32.070.0210	32.070.0240
26"	32.070.0220	32.070.0250

	Standard	Optionen / Options		
	Aluminium Aluminum	Stahl Steel	Maxgrepp Original	Maxgrepp Ergo Para CP
22"	02.400.2223	02.402.2202	02.069.0051	02.069.0041
24"	02.400.2424	02.402.2402	02.069.0050	02.069.0040
26"	02.400.2629	02.402.2602	02.069.0052	02.069.0042

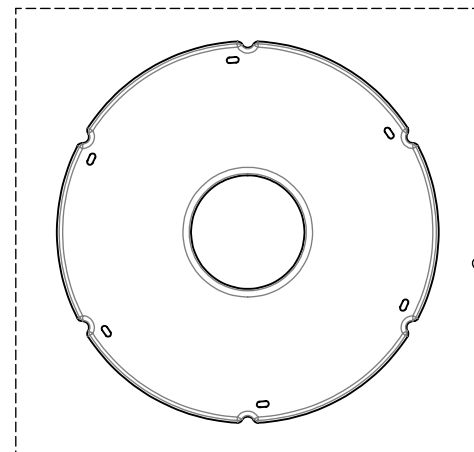

	transparent
22"	02.066.1014
24"	02.066.1015
26"	02.066.1017

Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	TN	Benennung / <i>Description</i> Standard Rad Standard wheel		
Geändert <i>Modified</i>	26.01.2015	PW			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	26.01.2015	FW			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
LEVO[®]  AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.0710	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> D

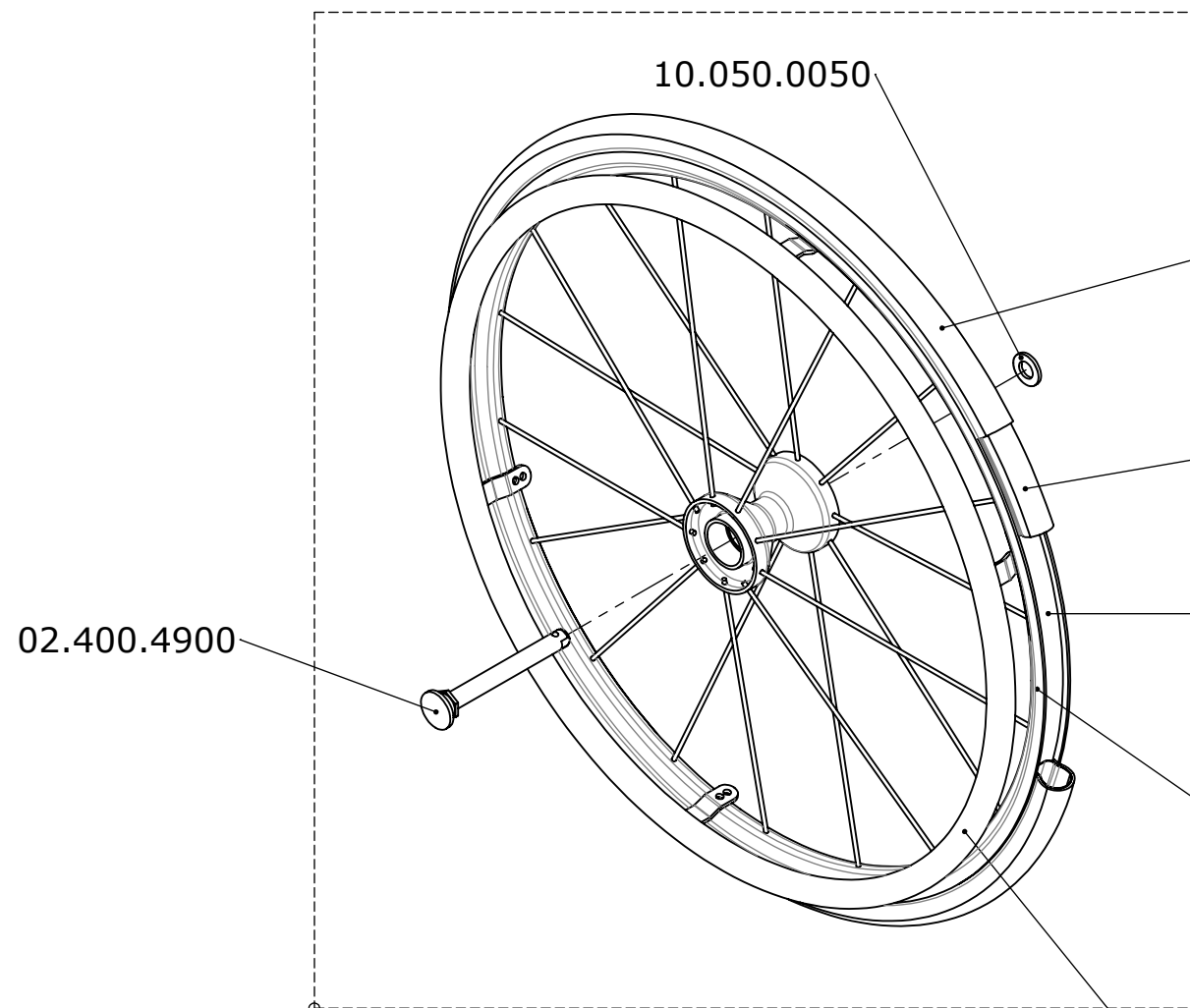

	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	02.400.2212	02.400.2322
24"	02.400.2425	02.400.2324
26"	02.400.2627	02.400.2326

22"	02.400.2215
24"	02.400.2426
26"	02.400.2628

22"	02.400.2216
24"	02.400.2427
26"	02.400.2630

22"	schwarz	02.403.2201
	rot	02.403.2203
	weiss	02.403.2205
24"	schwarz	02.403.2401
	rot	02.403.2403
	weiss	02.403.2405
26"	schwarz	02.403.2601
	rot	02.403.2603
	weiss	02.403.2605


		luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	schwarz	32.070.0261	32.070.0291
	rot	32.070.0262	32.070.0292
	weiss	32.070.0263	32.070.0293
24"	schwarz	32.070.0271	32.070.0301
	rot	32.070.0272	32.070.0302
	weiss	32.070.0273	32.070.0303
26"	schwarz	32.070.0281	32.070.0311
	rot	32.070.0282	32.070.0312
	weiss	32.070.0283	32.070.0313

	Standard	Optionen / Options		
	Aluminium Aluminum	Stahl Steel	Maxgrepp Original	Maxgrepp Ergo Para CP
22"	02.400.2223	02.402.2202	02.069.0051	02.069.0041
24"	02.400.2424	02.402.2402	02.069.0050	02.069.0040
26"	02.400.2629	02.402.2602	02.069.0052	02.069.0042

Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	PW	Benennung / Description Spinergy Rad Spinergy wheel		
Geändert <i>Modified</i>	25.07.2018	PW			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	25.07.2018	HB			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch 			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.0720	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / Rev. A

02.400.1000

02.001.1322

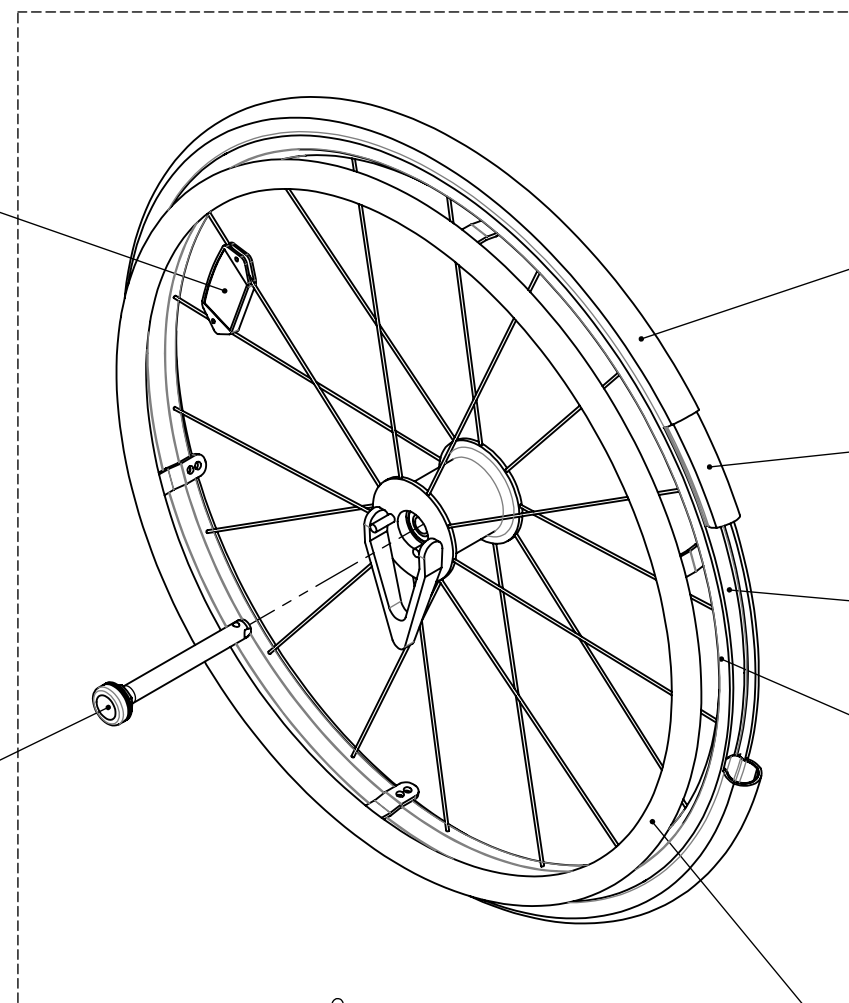

	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	02.400.2212	02.400.2322
24"	02.400.2425	02.400.2324
26"	02.400.2627	02.400.2326


22"	02.400.2215
24"	02.400.2426
26"	02.400.2628

22"	02.400.2216
24"	02.400.2427
26"	02.400.2630

22"	02.001.1319
24"	02.001.1320
26"	02.001.1321

	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	32.070.0320	32.070.0350
24"	32.070.0330	32.070.0360
26"	32.070.0340	32.070.0370

	Standard	Optionen / Options		
	Aluminium Aluminum	Stahl Steel	Maxgrepp Original	Maxgrepp Ergo Para CP
22"	02.400.2223	02.402.2202	02.069.0051	02.069.0041
24"	02.400.2424	02.402.2402	02.069.0050	02.069.0040
26"	02.400.2629	02.402.2602	02.069.0052	02.069.0042

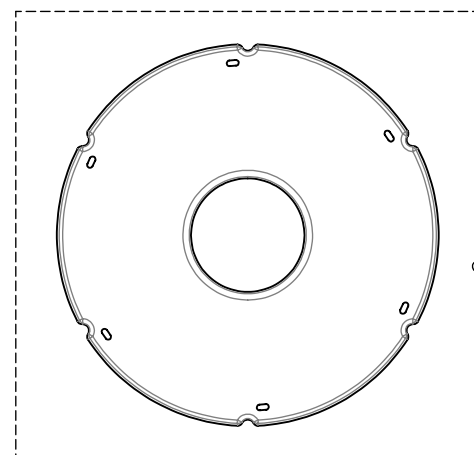

	transparent
22"	02.066.1014
24"	02.066.1015
26"	02.066.1017

Erstellt Prepared	17.08.2007	MT
Geändert Modified	30.01.2015	PW
Gepr./Freig. Approved	30.01.2015	FW
Status Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Rad zu Nabenfeststellbremse
Wheel to hub locking brake

LEVO ^{dt}
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch


Rollstuhl
Wheelchair

LCEV


Artikelnummer
Art. no.

50.070.0730

Blatt / Anz.
Sheet / no. of
1 / 1
Index / Rev.
B

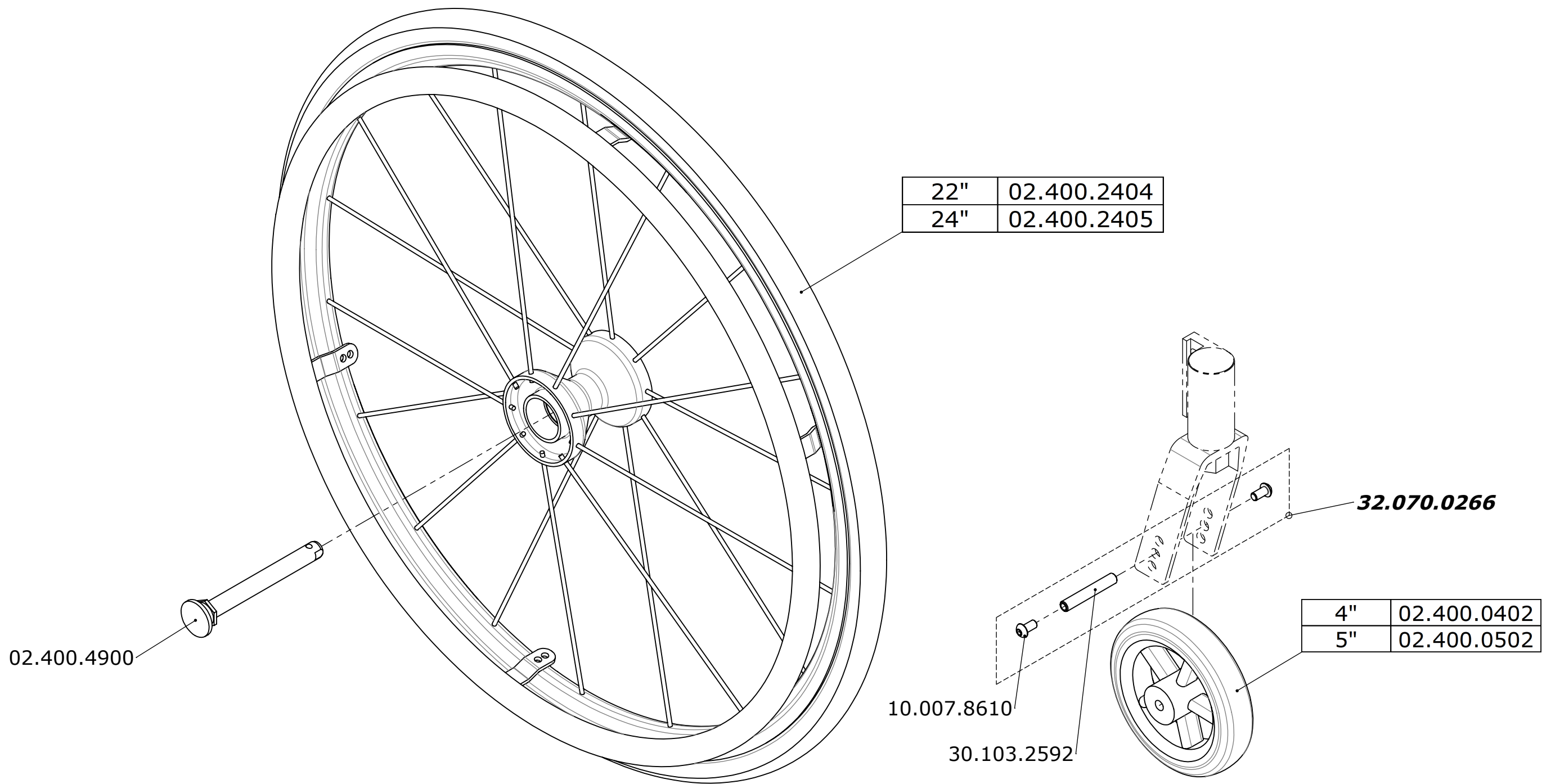

Erstellt <i>Prepared</i>	13.03.2018	PW	Benennung / <i>Description</i> Rad-Satz Gewichts-Reduktion Wheel kit weight reduction		
Geändert <i>Modified</i>	23.04.2019	PW			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	23.04.2019	BB			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.0750 Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / Rev. A					

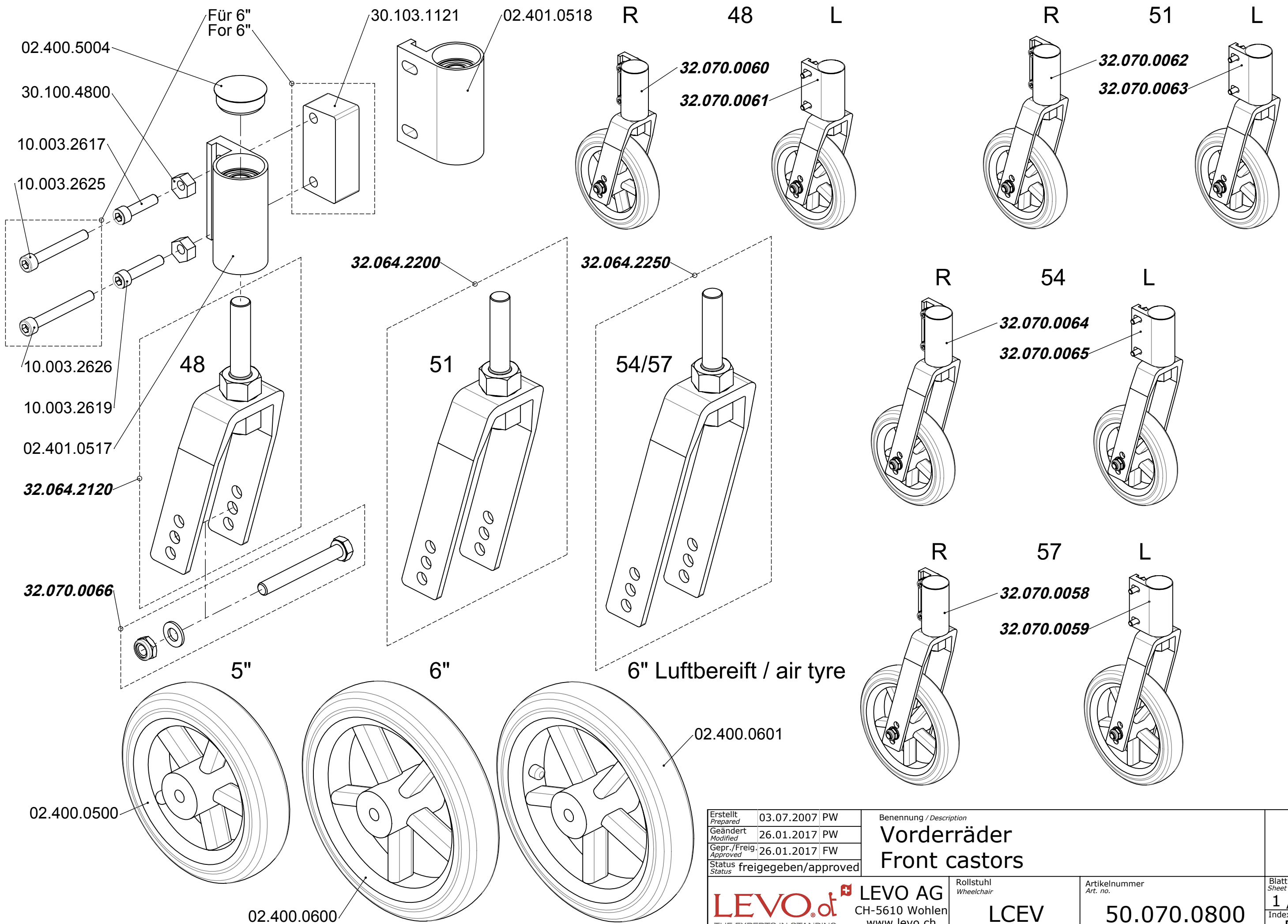

Erstellt Prepared	03.07.2007	PW
Geändert Modified	26.01.2017	PW
Gepr./Freig. Approved	26.01.2017	FW
Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Vorderräder
Front castors

LEVO 
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch


Rollstuhl
Wheelchair

LCEV


Artikelnummer
Art. no.

50.070.0800

Blatt / Anz.
Sheet / no. of
1 / 1
Index / Rev.
B

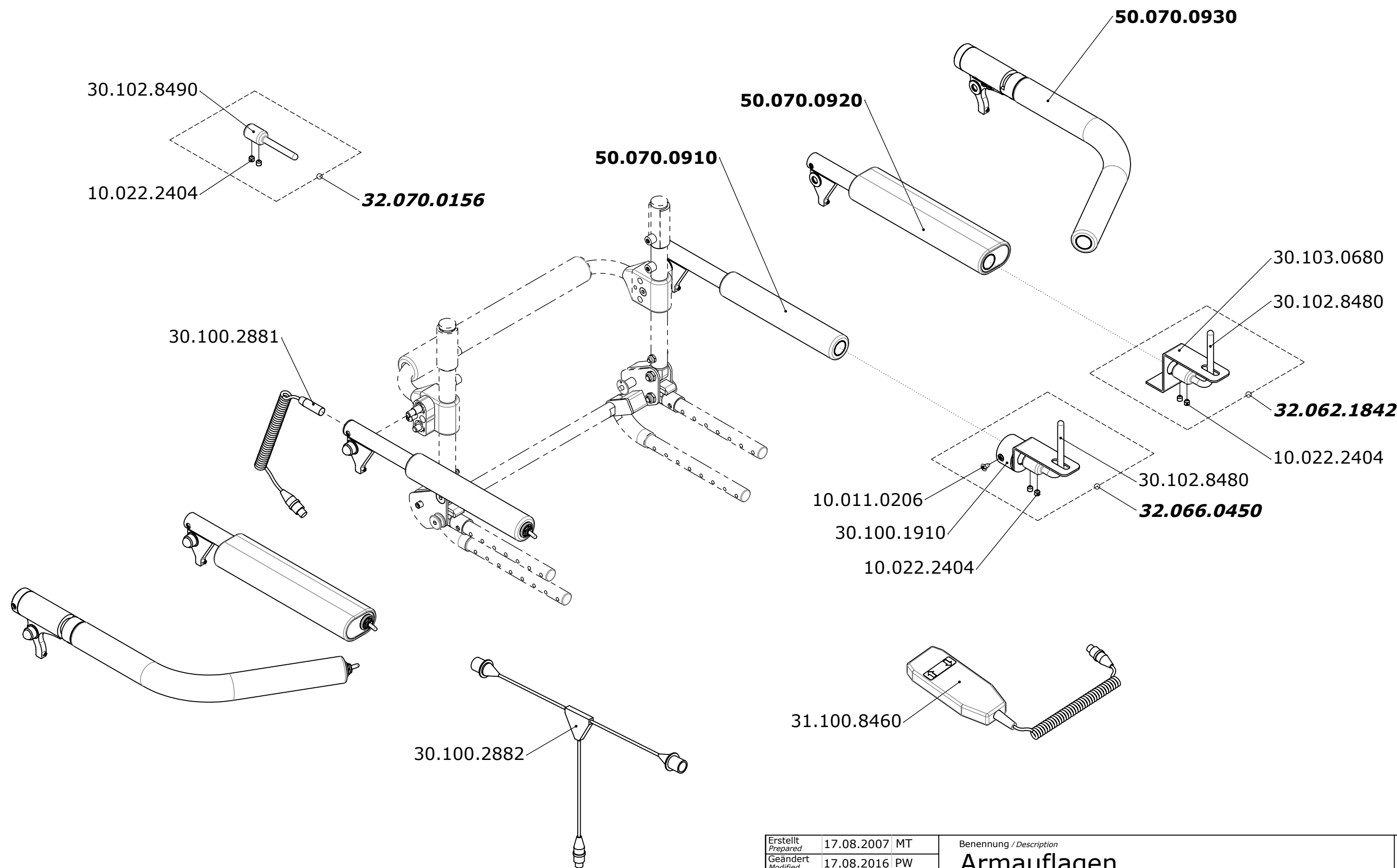

Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / <i>Description</i> Armauflagen Arm supports			
Geändert <i>Modified</i>	17.08.2016	PW				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	17.08.2016	FW				
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved					
  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.0900 Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> A						

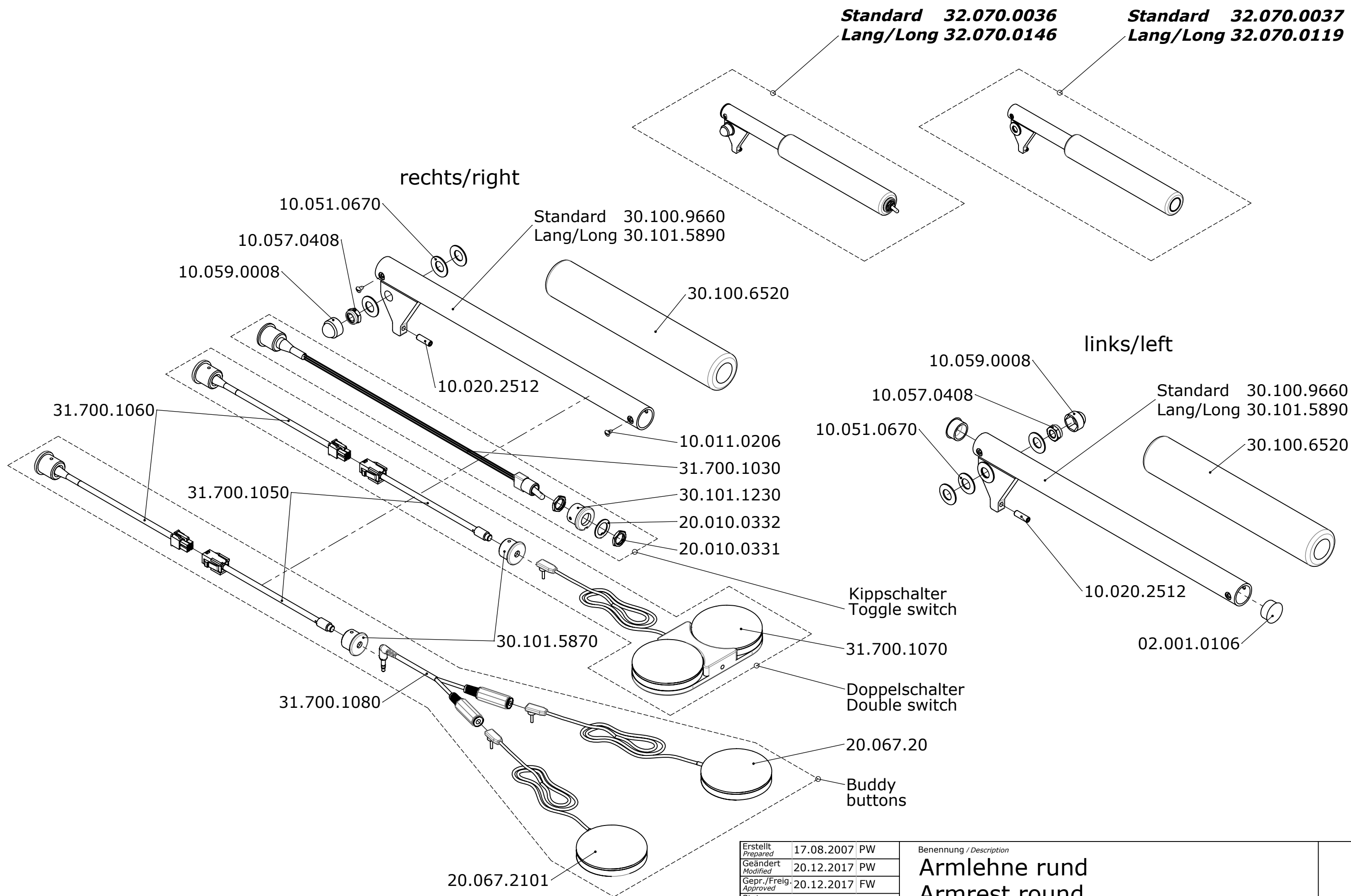

Erstellt Prepared	17.08.2007	PW
Geändert Modified	20.12.2017	PW
Gepr./Freig. Approved	20.12.2017	FW
Status Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Armlehne rund
Armrest round

LEVO 
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch

Rollstuhl
Wheelchair


LCEV

Artikelnummer
Art. no.

50.070.0910





Blatt / Anz.
Sheet / no. of

1 / 1
Index / Rev.
D

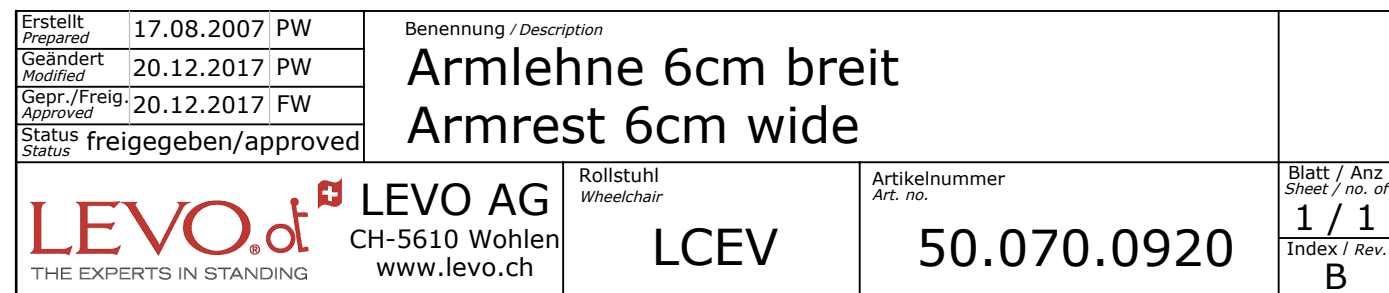

rechts/right

links/left

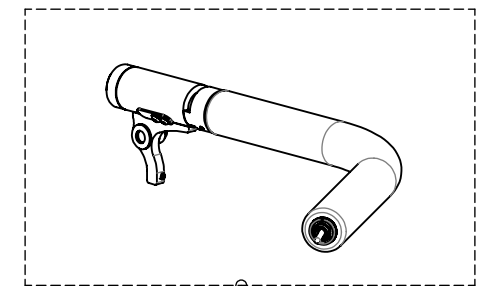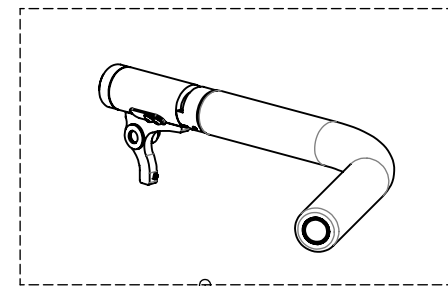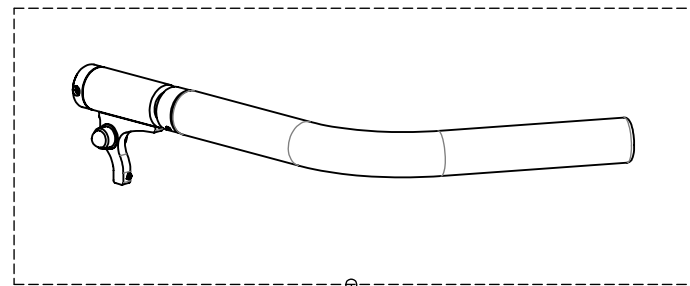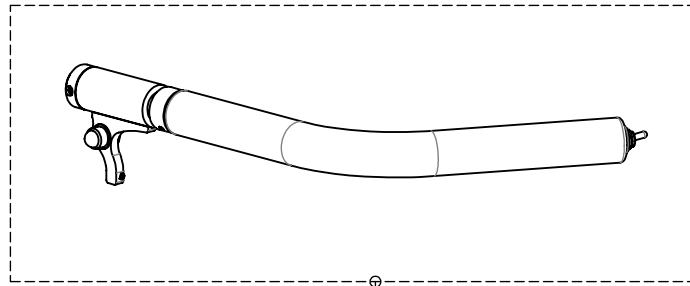


Grösse Size	
27 cm	32.070.0085
32 cm	32.070.0095
37 cm	32.070.0105

Grösse Size	
27 cm	32.070.0083
32 cm	32.070.0093
37 cm	32.070.0103

Grösse Size	
27 cm	32.070.0084
32 cm	32.070.0094
37 cm	32.070.0104

Grösse Size	
27 cm	32.070.0086
32 cm	32.070.0096
37 cm	32.070.0106

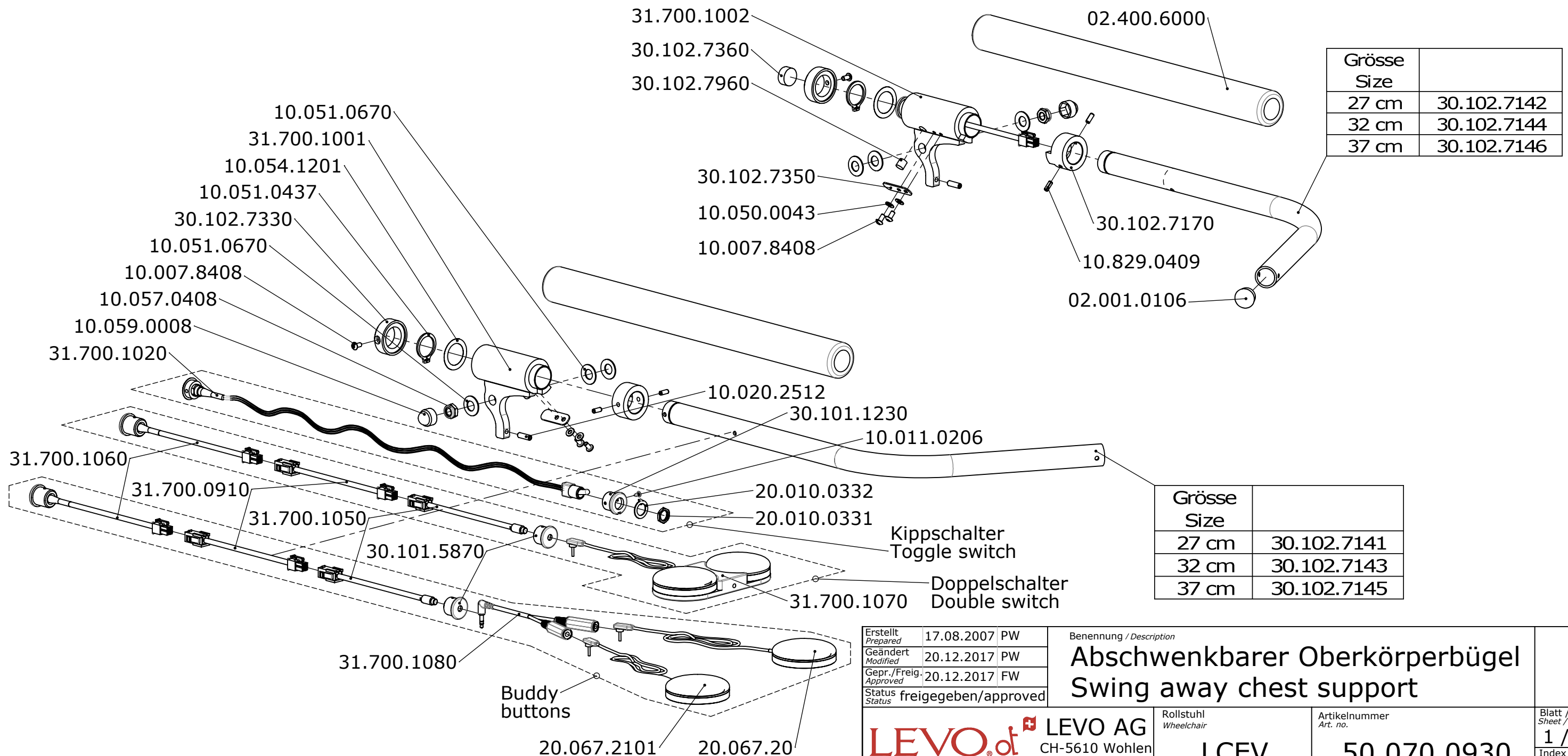

Erstellt Prepared	17.08.2007	PW
Geändert Modified	20.12.2017	PW
Gepr./Freig. Approved	20.12.2017	FW
Status Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Abschwenkbarer Oberkörperbügel
Swing away chest support





LEVO ^{dt}
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch

Rollstuhl
Wheelchair
LCEV


Artikelnummer
Art. no.
50.070.0930

Blatt / Anz.
Sheet / no. of
1 / 1
Index / Rev.
A

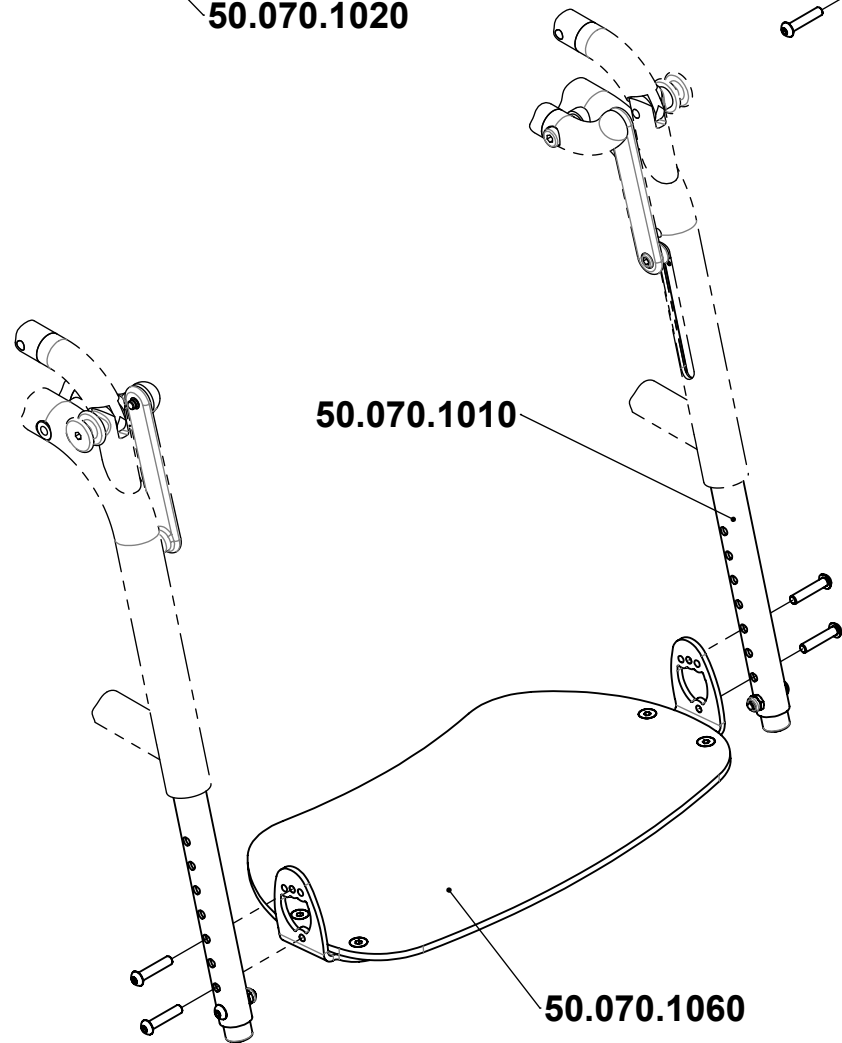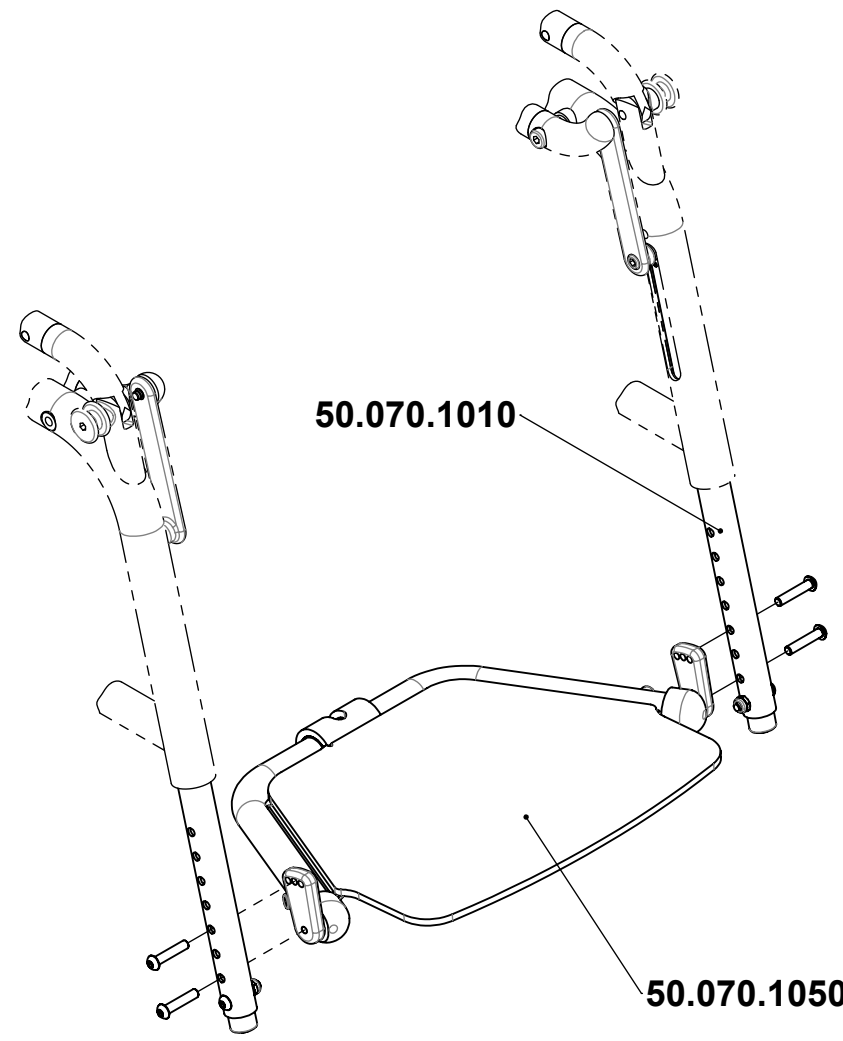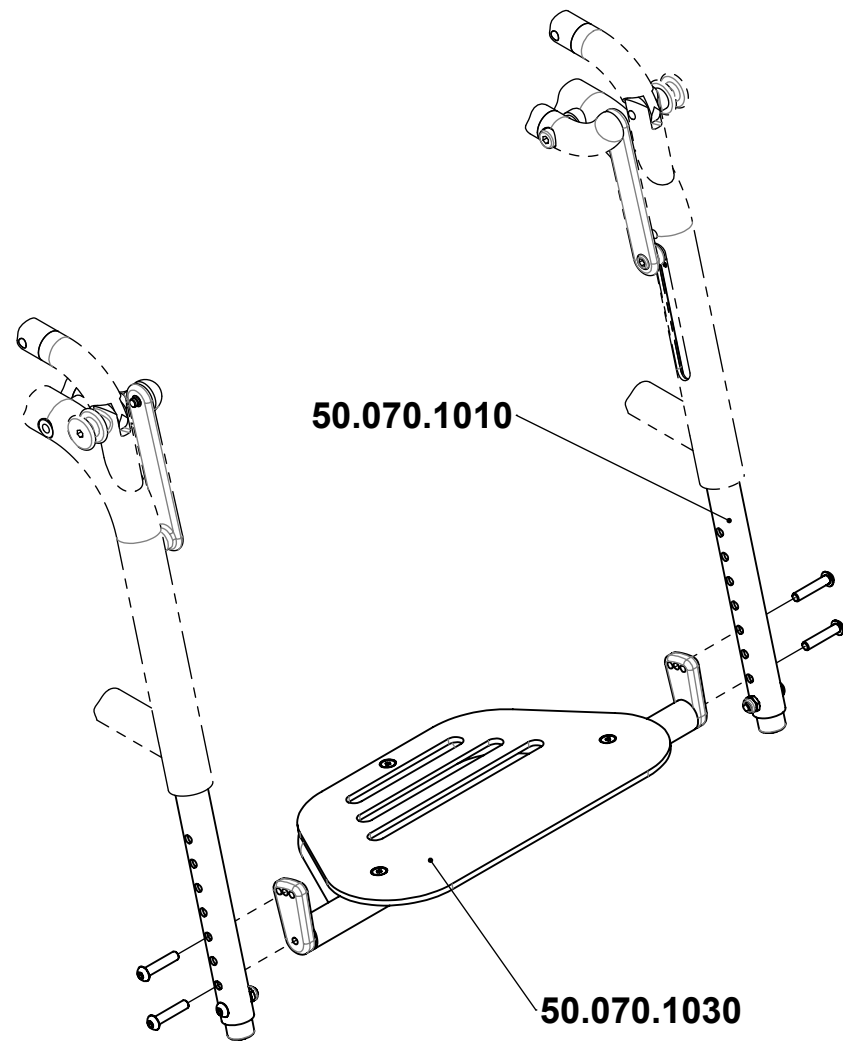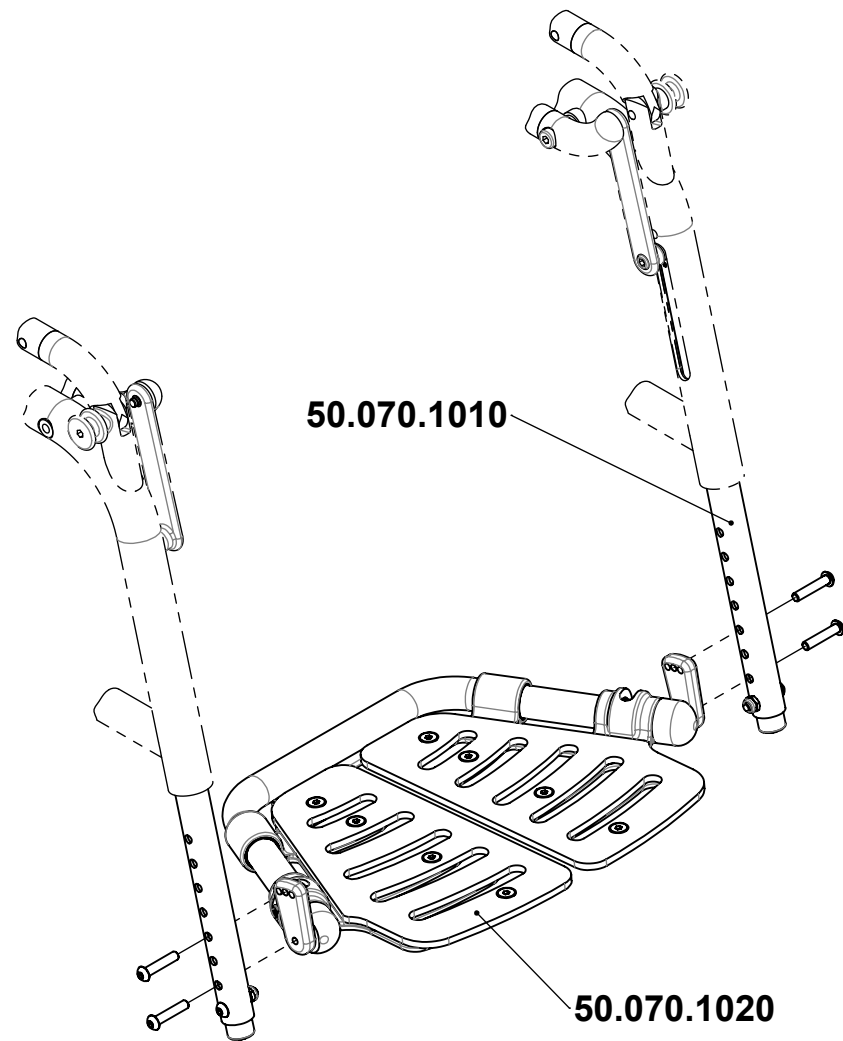


Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / Description Beinstützen und Fussauflagen Legrests and Footrests			
Geändert <i>Modified</i>	27.06.2013	PW				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	27.06.2013	BM				
Status in Bearbeitung/in process <i>Status</i>						
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.1000 Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / Rev. B						

Beinstütze fix
fixed legrest

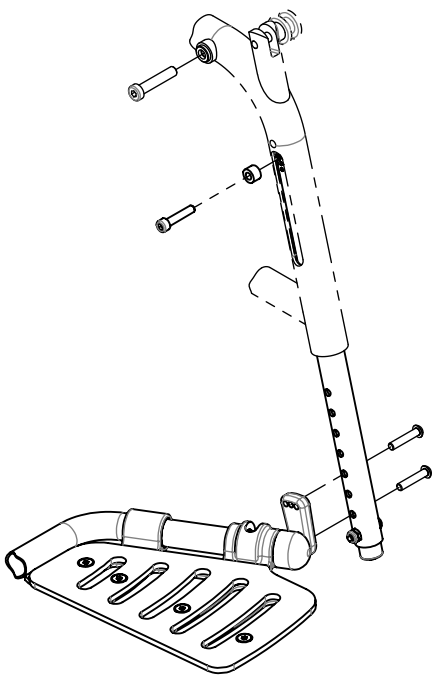


<i>Sitzhöhe</i> <i>Seat height</i>	
48	32.069.33
51	32.069.34
54	32.069.35
57	32.069.36

<i>Sitzhöhe</i> <i>Seat height</i>	
48	30.100.7110
51	30.100.7560
54	30.100.6650
57	30.100.7170

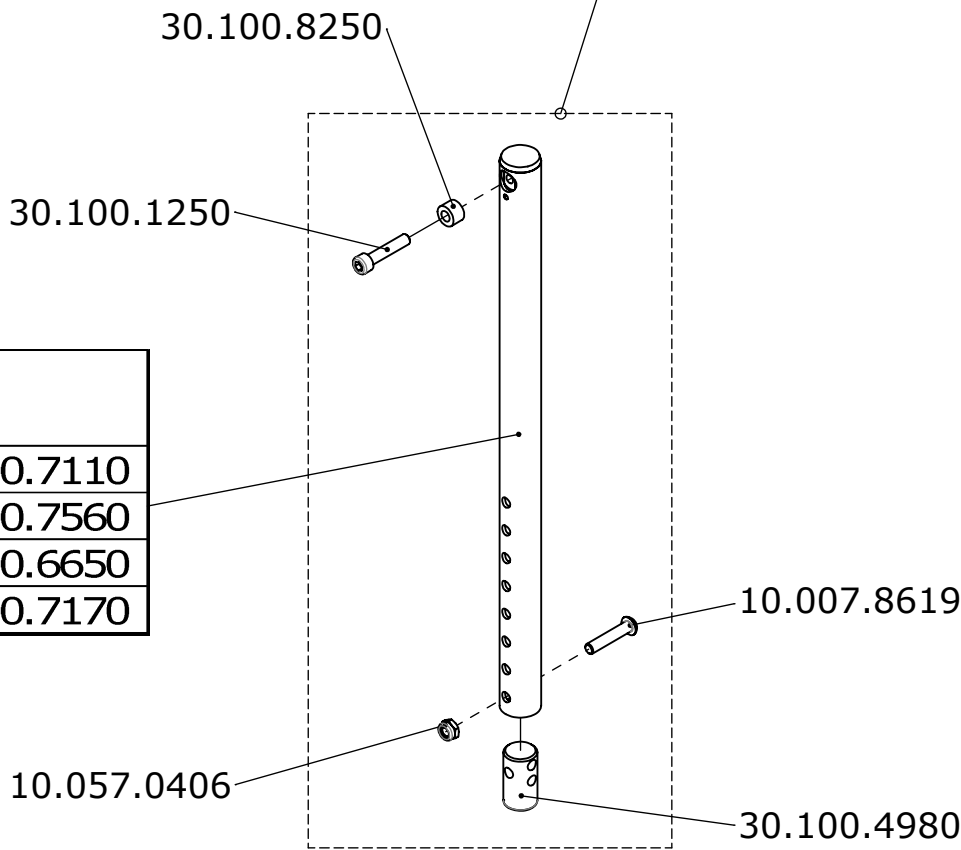


abnehmbare Beinstütze
removable legrest

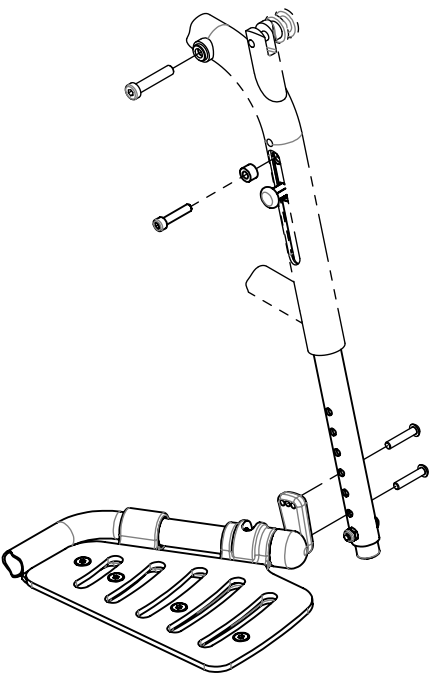

<i>Sitzhöhe</i> <i>Seat height</i>	
48	32.069.51
51	32.069.52
54	32.069.53
57	32.069.54


<i>Sitzhöhe</i> <i>Seat height</i>	
48	30.100.3560
51	30.100.2430
54	30.100.3580
57	30.100.3590

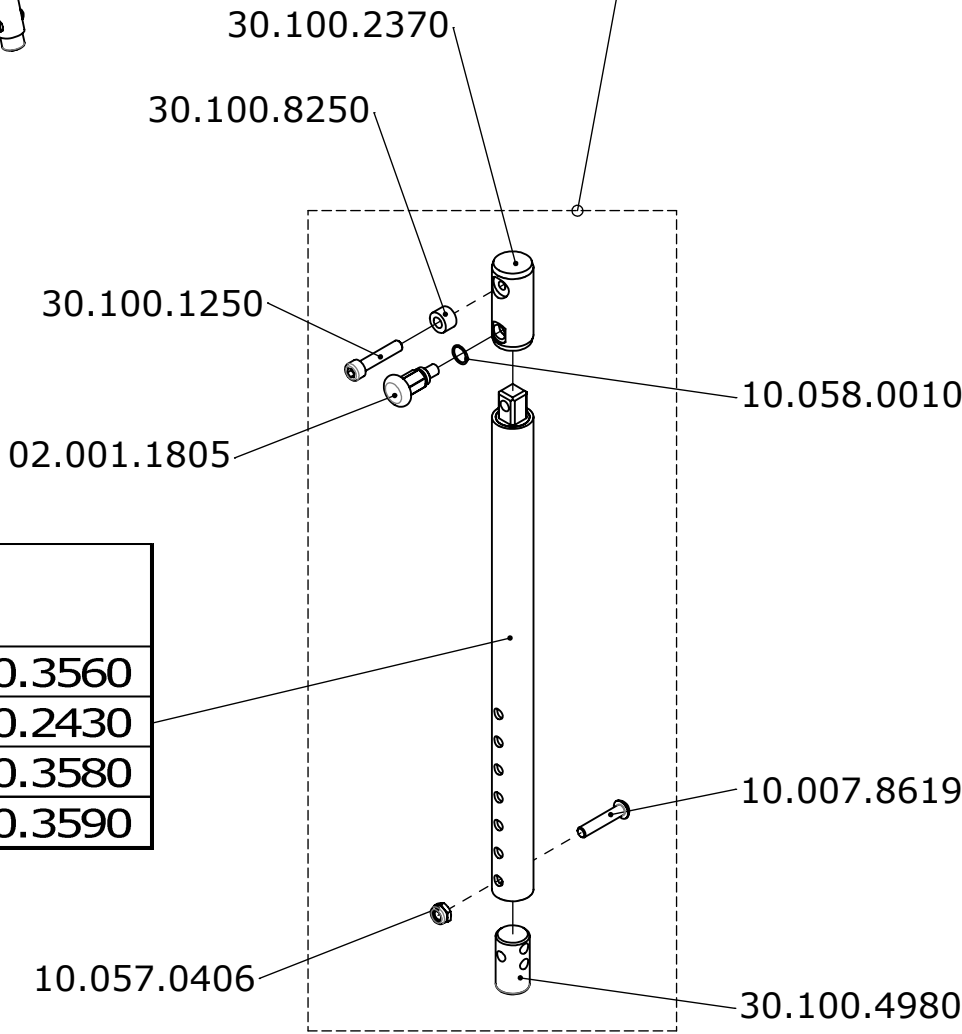

Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / <i>Description</i> Beinstützen Legrests			
Geändert <i>Modified</i>		-				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN				
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved					
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i>	
			LCEV	50.070.1010	1 / 1 Index / <i>Rev.</i> -	

Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.
35	30.102.9831
38	30.102.9832
40	30.102.9833
42	30.102.9834
45	30.102.9835
48	30.102.9836
50	30.102.9837

Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.
35	30.102.9511
38	30.102.9512
40	30.102.9513
42	30.102.9514
45	30.102.9515
48	30.102.9516
50	30.102.9517

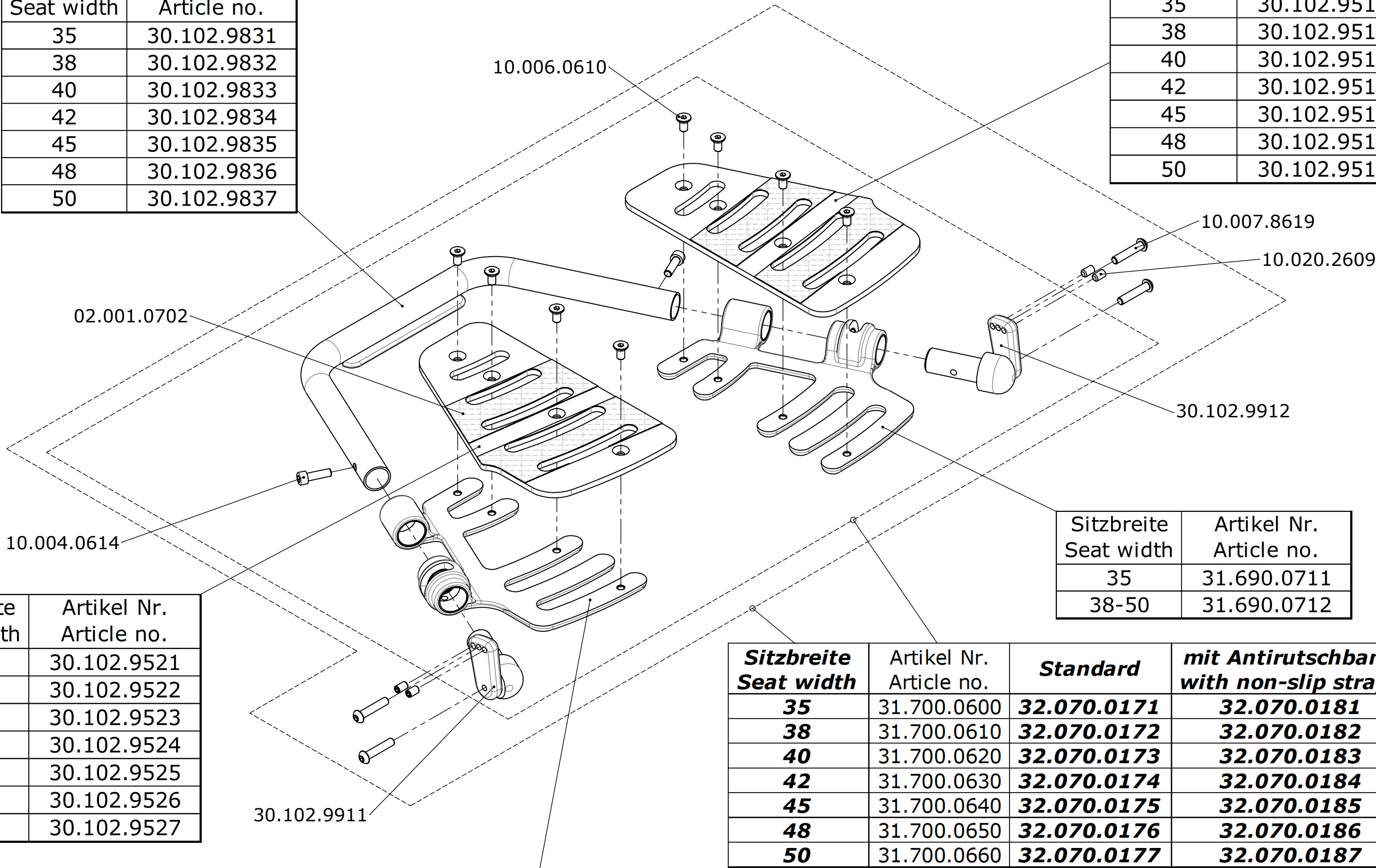

Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.
35	30.102.9521
38	30.102.9522
40	30.102.9523
42	30.102.9524
45	30.102.9525
48	30.102.9526
50	30.102.9527

Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.
35	31.690.0711
38-50	31.690.0712

Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.
35	31.690.0701
38-50	31.690.0702


Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.	Standard	mit Antirutschband with non-slip straps
35	31.700.0600	32.070.0171	32.070.0181
38	31.700.0610	32.070.0172	32.070.0182
40	31.700.0620	32.070.0173	32.070.0183
42	31.700.0630	32.070.0174	32.070.0184
45	31.700.0640	32.070.0175	32.070.0185
48	31.700.0650	32.070.0176	32.070.0186
50	31.700.0660	32.070.0177	32.070.0187

Erstellt Prepared	17.08.2007	MT
Geändert Modified	02.11.2009	PW
Gepr./Freig. Approved	02.11.2008	TN
Status Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description
Fussauflage 2-teilig hochklappbar
Two-piece flip-up footrest

Sitzbreite Seat width	Artikelnummer Article no.
35	30.100.7430
38	
40	30.100.7470
42	30.100.7410
45	30.100.7420
48	
50	

Sitzbreite Seat width	Artikelnummer Article no.
35	30.101.6100
38	30.100.7340
40	30.100.7360
42	30.100.7380
45	30.100.7400
48	30.100.8330
50	30.102.2520

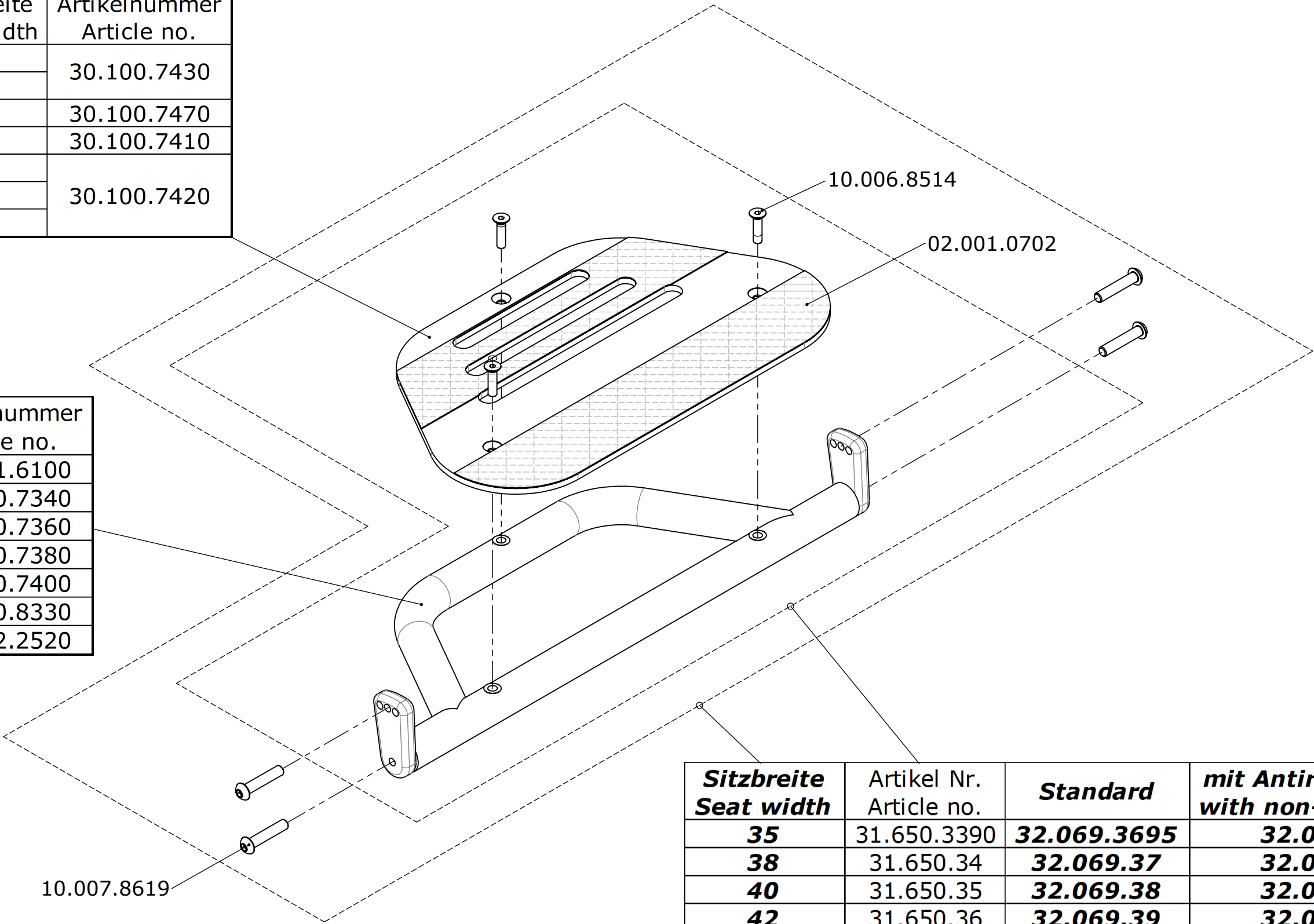

Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.	Standard	mit Antirutschband with non-slip straps
35	31.650.3390	32.069.3695	32.069.89
38	31.650.34	32.069.37	32.069.90
40	31.650.35	32.069.38	32.069.91
42	31.650.36	32.069.39	32.069.92
45	31.650.37	32.069.40	32.069.93
48	31.650.38	32.065.40	32.065.69
50	31.650.39	32.065.4005	32.065.4015

Erstellt Prepared	17.08.2007	MT
Geändert Modified		-
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	TN
Status Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Fussauflage einteilig starr
One-piece footrest fix

LEVO ^{dt} **LEVO AG**
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch
THE EXPERTS IN STANDING


Rollstuhl
Wheelchair
LCEV

Artikelnummer
Art. no.
50.070.1030

Blatt / Anz.
Sheet / no. of
1 / 1
Index / Rev.
-

X : (1 : 1)


Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.
35	30.102.9621
38	30.102.9622
40	30.102.9623
42	30.102.9624
45	30.102.9625
48	30.102.9626
50	30.102.9627

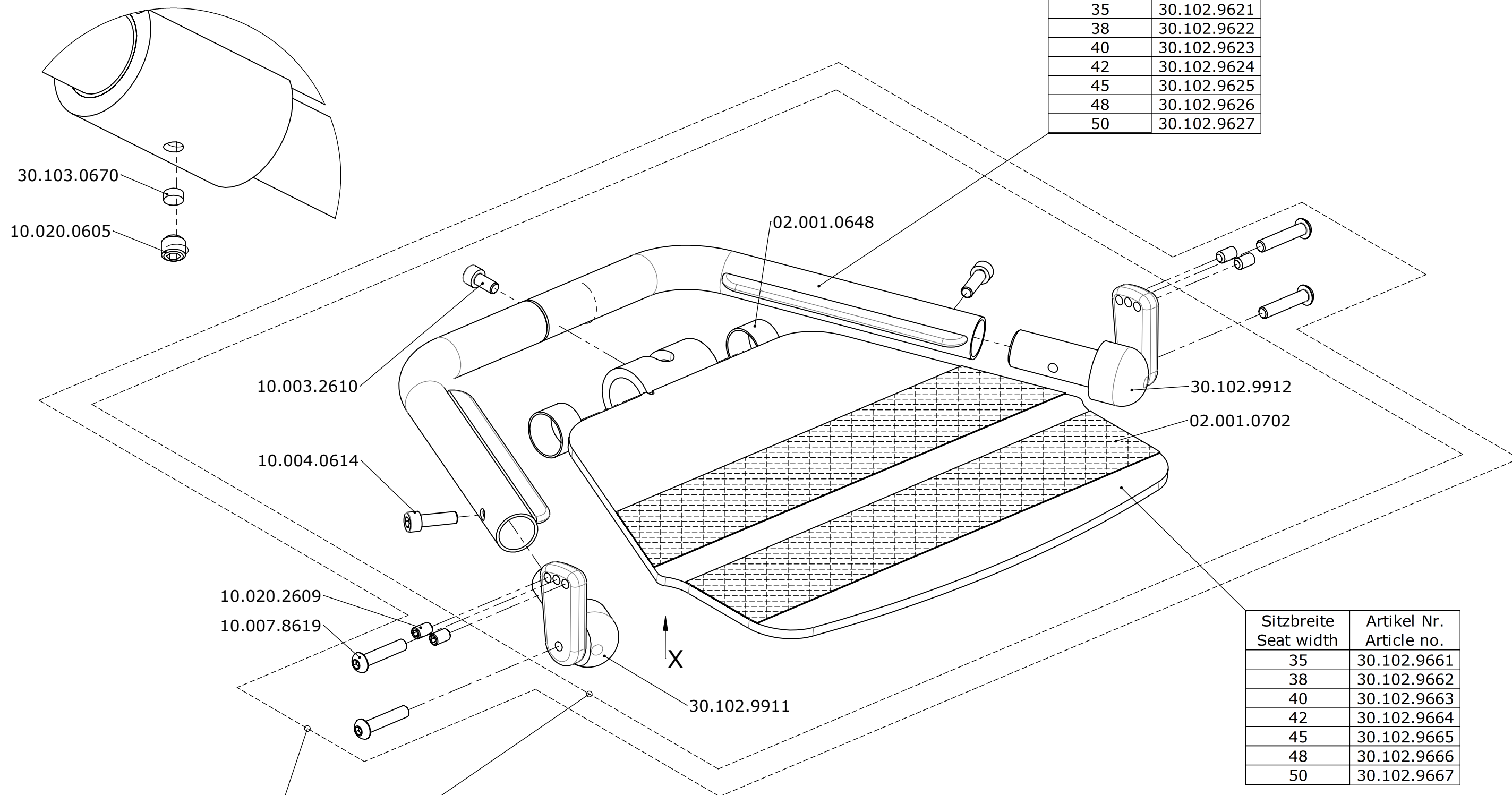


Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.	Standard	mit Antirutschband with non-slip straps
35	31.700.0700	32.070.0511	32.070.0521
38	31.700.0710	32.070.0512	32.070.0522
40	31.700.0720	32.070.0513	32.070.0523
42	31.700.0730	32.070.0514	32.070.0524
45	31.700.0740	32.070.0515	32.070.0525
48	31.700.0750	32.070.0516	32.070.0526
50	31.700.0760	32.070.0517	32.070.0527

Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.
35	30.102.9661
38	30.102.9662
40	30.102.9663
42	30.102.9664
45	30.102.9665
48	30.102.9666
50	30.102.9667

Erstellt <i>Prepared</i>	20.05.2010	PW	Benennung / <i>Description</i> Fussauflage 1-teilig hochklappbar One-piece flip-up footrest			
Geändert <i>Modified</i>	18.02.2011	PW				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	18.02.2011	BM				
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved					
 THE EXPERTS IN STANDING	 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	50.070.1050	Blatt / An <i>Sheet / no.</i>
						1 / 1 Index / <i>Re</i>
						A

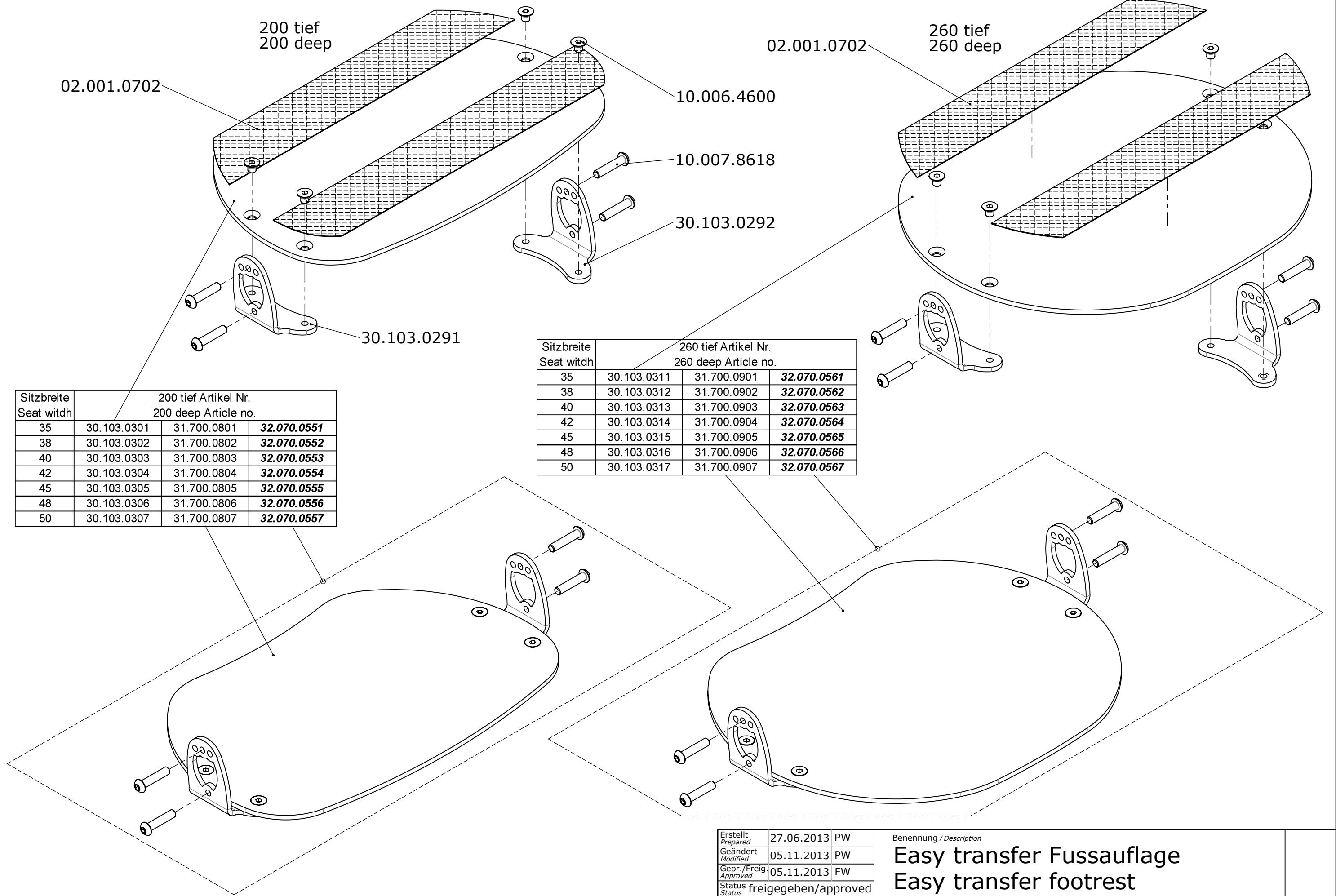


Erstellt Prepared	27.06.2013 PW	Benennung / Description Easy transfer Fussauflage Easy transfer footrest		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev. C
Geändert Modified	05.11.2013 PW			
Gepr./Freig. Approved	05.11.2013 FW			
Status	freigegeben/approved			
LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch		Rollstuhl Wheelchair LCEV	Artikelnummer Art. no. 50.070.1060	

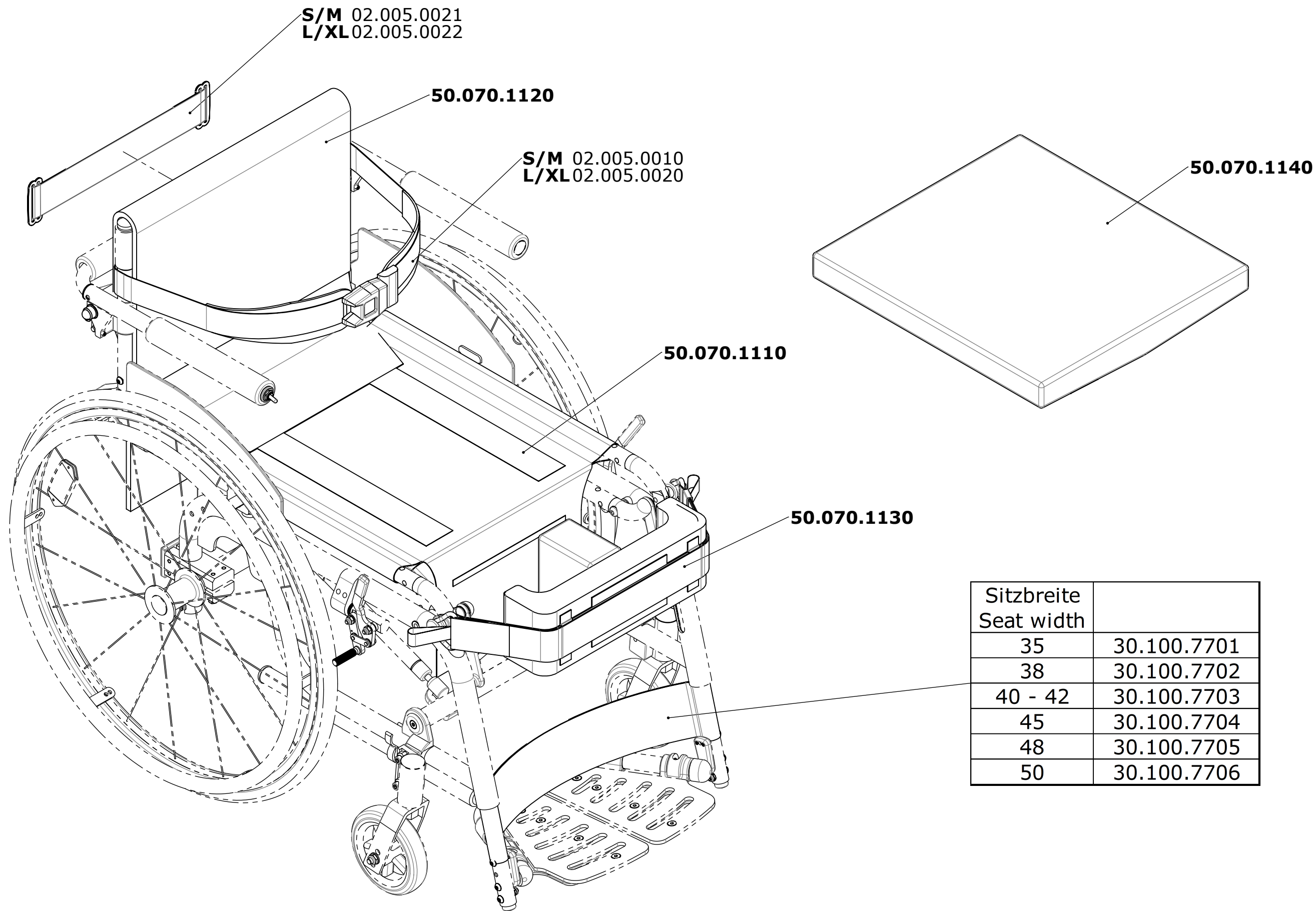

Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / <i>Description</i> Polster und Sicherheitsgurtsystem Upholstery and safety harness		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
LEVO[®].⁺ THE EXPERTS IN STANDING			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.1100	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> -
CH-5610 Wohlen www.levo.ch					

Grösse Size	Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.
S/M	35	32.069.0046
	38 - 40	32.069.0023
	42	32.069.0024
	45 - 48	32.069.0025
	50	32.069.0052
L/LX	35	32.069.0048
	38 - 40	32.069.0029
	42	32.069.0030
	45 - 48	32.069.0031
	50	32.069.0049



Grösse Size	Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.
S/M	35	30.101.5154
	38 - 40	30.101.5151
	42	30.101.5152
	45 - 48	30.101.5153
	50	30.101.5155
L/LX	35	30.101.3444
	38 - 40	30.101.3441
	42	30.101.3442
	45 - 48	30.101.3443
	50	30.101.3446

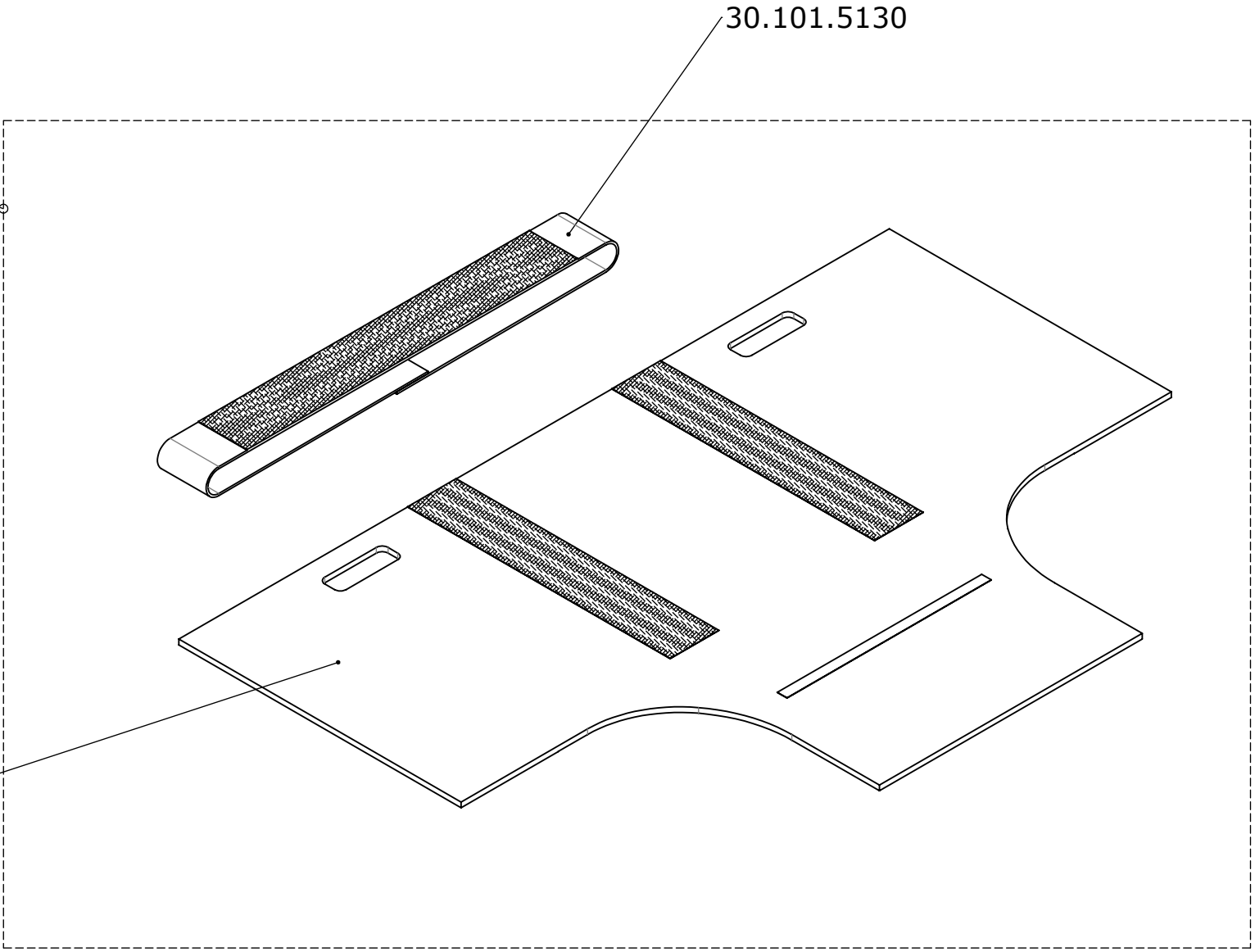

30.101.5130

Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / <i>Description</i> Sitzpolster Seat upholstery			
Geändert <i>Modified</i>		-				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN				
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved					
LEVO[®]._{dt} THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.1110	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> -

Sitzbreite Seat width	Artikel Nr. Article no.
35	30.101.3384
38 - 40	30.101.3381
42	30.101.3382
45 - 48	30.101.3383
50	30.101.3386

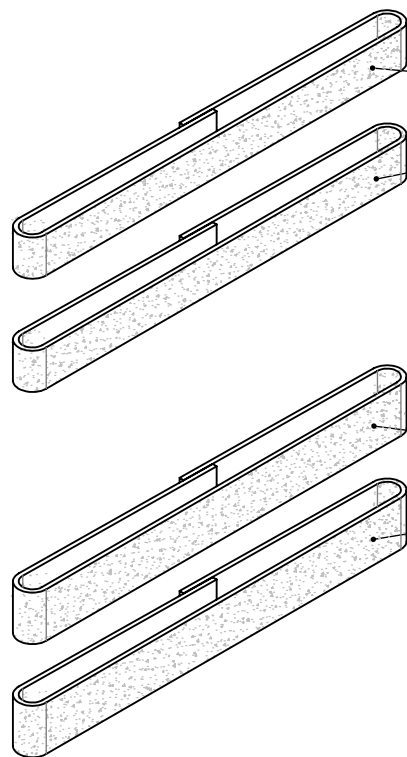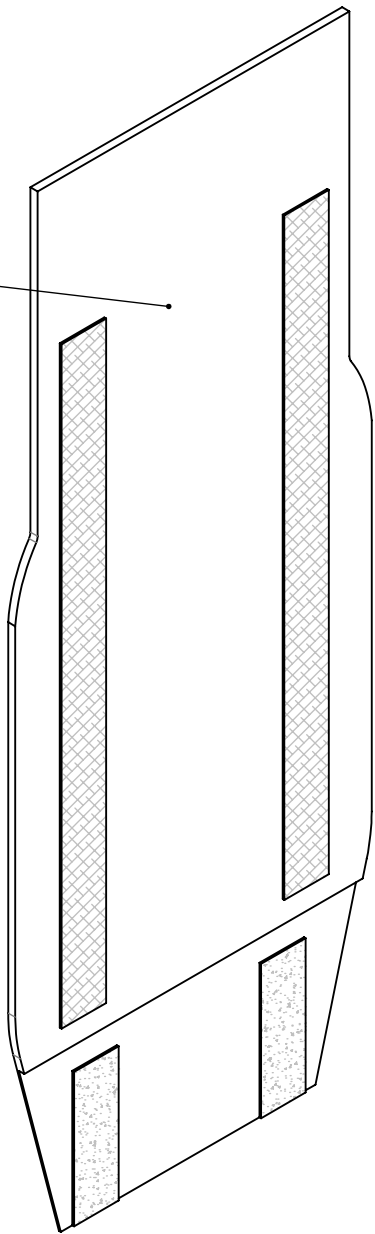

Sitzbreite Seat width	Gurt 40 Strap 40
35 - 48	30.101.3402
50	30.101.3404


Sitzbreite Seat width	Gurt 50 Strap 50
35 - 48	30.101.3401
50	30.101.3403

Rückenpolsterhöhe Backrest height	Gurt 40 Strap 40 [Stk./pcs.]	Gurt 50 Strap 50 [Stk./pcs.]
31	2	2
33	3	2
35	3	2
37	2	3
39	4	2
41	2	4

Erstellt <i>Prepared</i> Geändert <i>Modified</i> Gepr./Freig. <i>Approved</i> Status <i>Status</i>	12.09.2007 30.04.2008 freigegeben/approved	PW - TN	Benennung / <i>Description</i> Rückenpolster Backrest upholstery	Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.1120	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> -
LEVO[®]  THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			

Dimension	Art.-Nr. Art.-no.
50x100	30.101.5391
60x100	30.101.5392
80x100	30.101.5393
50x150	30.101.5394
80x150	30.101.5395

Dimension	Art.-Nr. Art.-no.
50-100x100	30.101.8221
90-140x100	30.101.8222
130-180x100	30.101.8223

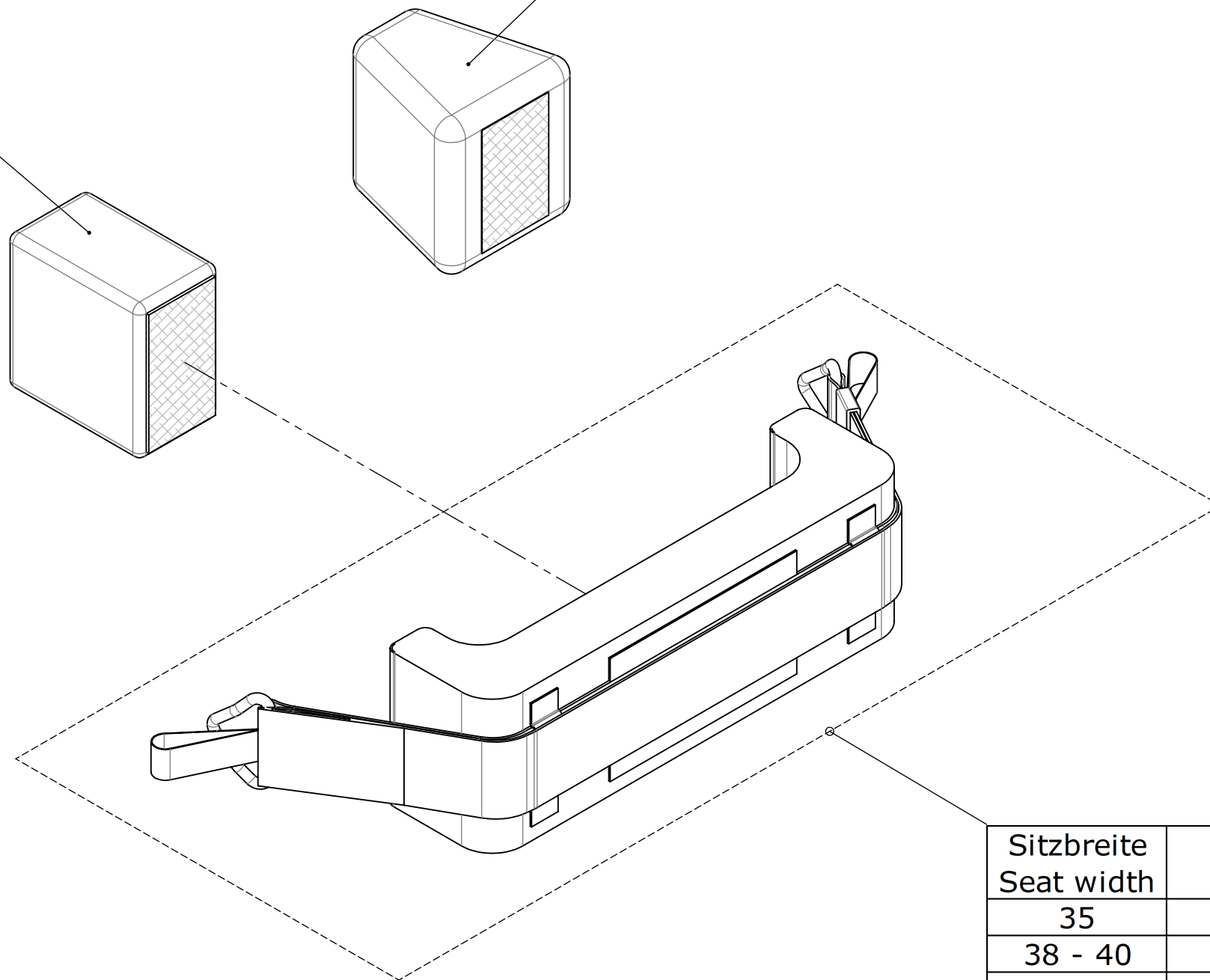


Standard Kombination:
Standard combination:


Sitzbreite Seat width	Typ Type	Kniekeil Wedge
35	2	50x100
38 - 40	3	60x100
42	4	
45	5	80x100
48 - 50	6	


Sitzbreite Seat width	Typ Type	Artikel Nr. Article no.
35	2	30.101.5403
38 - 40	3	30.101.5405
42	4	30.101.5407
45	5	30.101.5408
48 - 50	6	30.901.5403

Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / <i>Description</i> Kniehalter Knee support		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i>
			LCEV	50.070.1130	1 / 1 Index / <i>Rev.</i>
					-

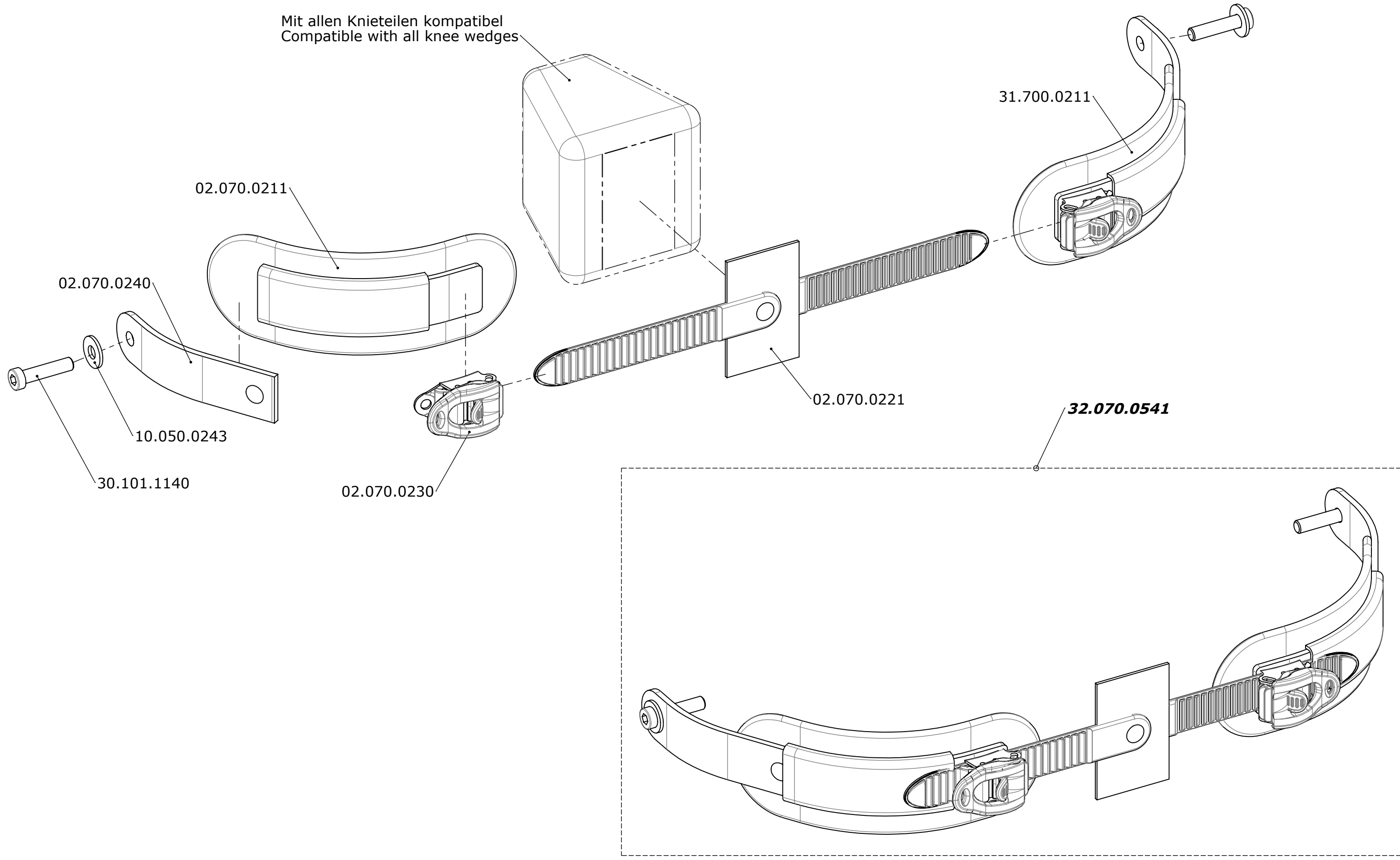


Erstellt <i>Prepared</i>	06.03.2014	PW	Benennung / Description Sports knee support		
Geändert <i>Modified</i>	07.08.2015	PW			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	07.08.2015	FW			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
LEVO[®]⁺ THE EXPERTS IN STANDING			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.1131	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / Rev. A
LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch					

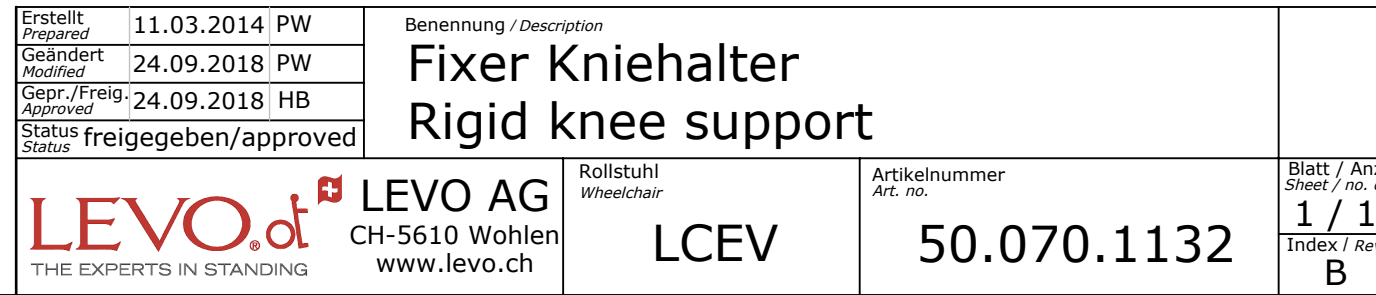

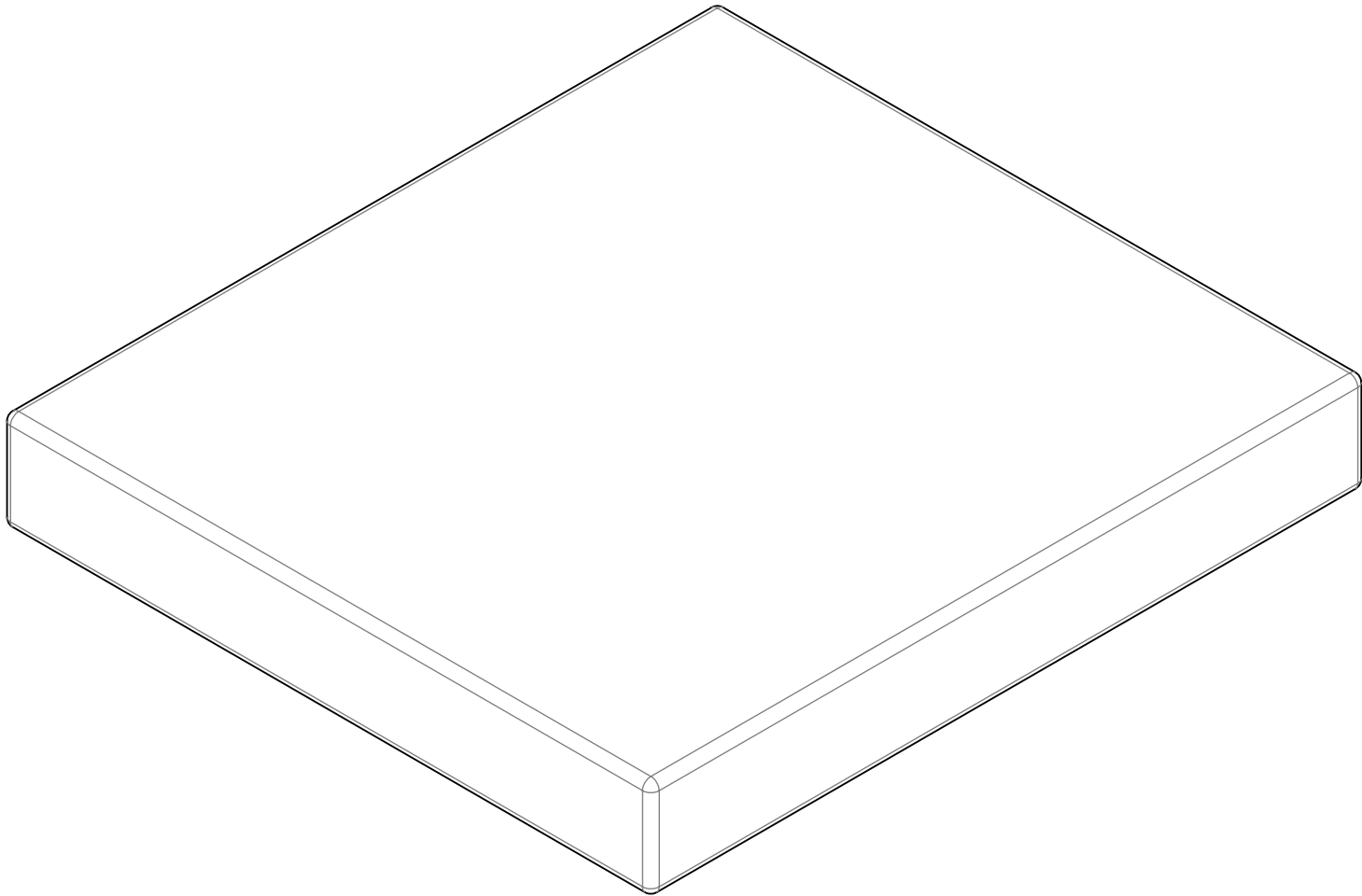


Grösse Size	Sitzbreite Seat width	Sitzkissen Seat cushion	Ersatzbezug Spare cover
S	35	30.100.3740	30.100.3741
	38	30.100.3770	30.100.3771
	40	30.100.3780	30.100.3781
	42	30.100.3790	30.100.3791
	45	30.100.3800	30.100.3801
	48	30.100.3802	30.100.3804
	50	30.100.3803	30.100.3805
M	35	30.100.3822	30.100.3823
	38	30.100.3820	30.100.3821
	40	30.100.3830	30.100.3831
	42	30.100.3840	30.100.3841
	45	30.100.3850	30.100.3851
	48	30.100.3855	30.100.3854
	50	30.100.3856	30.100.3953
L	35	30.100.3857	30.100.3858
	38	30.100.3860	30.100.3861
	40	30.100.3870	30.100.3871
	42	30.100.3880	30.100.3881
	45	30.100.3890	30.100.3891
	48	30.100.3900	30.100.3901
	50	30.100.3902	30.100.3903
XL	35	30.100.3907	30.100.3908
	38	30.100.3910	30.100.3911
	40	30.100.3920	30.100.3921
	42	30.100.3930	30.100.3931
	45	30.100.3940	30.100.3941
	48	30.100.3950	30.100.3951
	50	30.100.3956	30.100.3957


50.070.5100

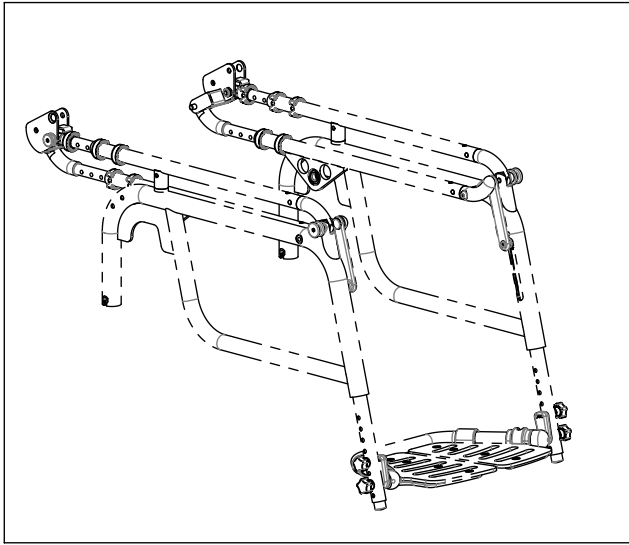


50.070.5200

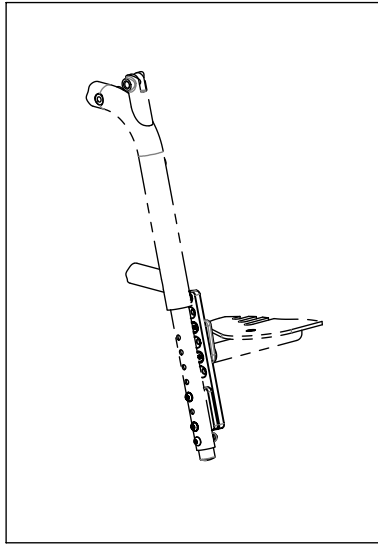


50.070.5300

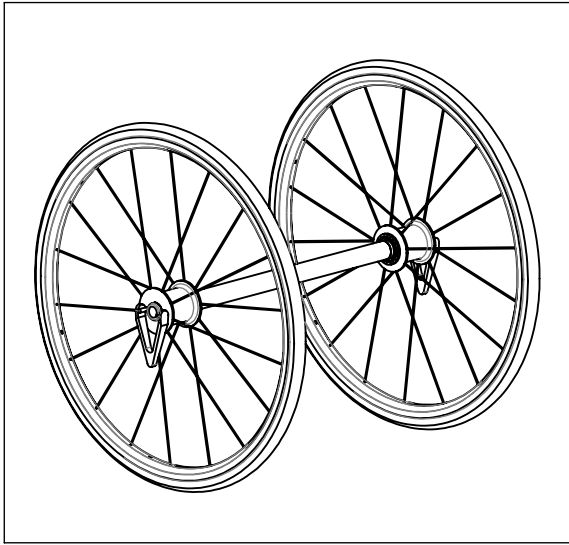


50.070.5400

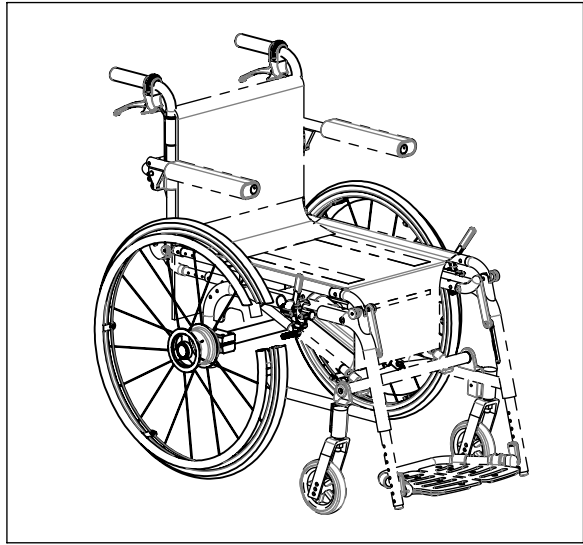


50.070.5500

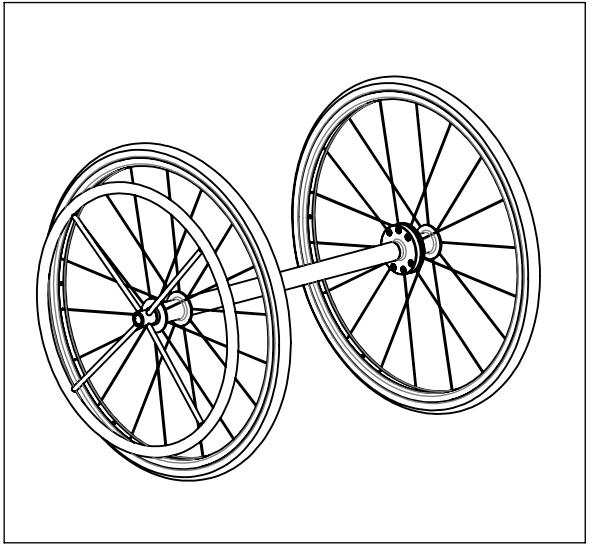


50.070.5610

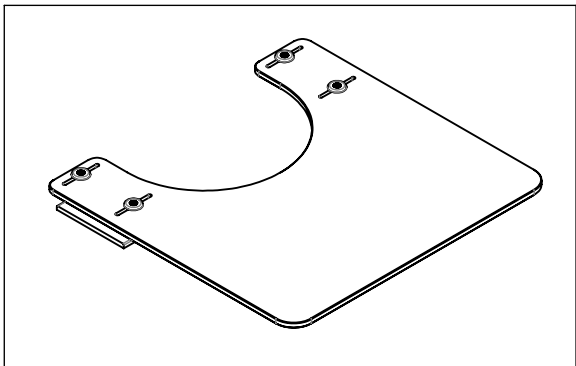


50.070.5620

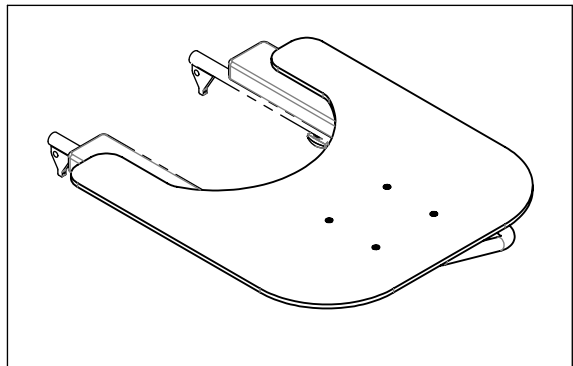


50.070.5700

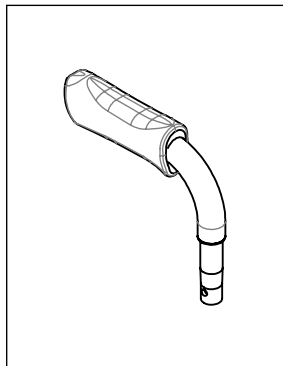


50.070.5710

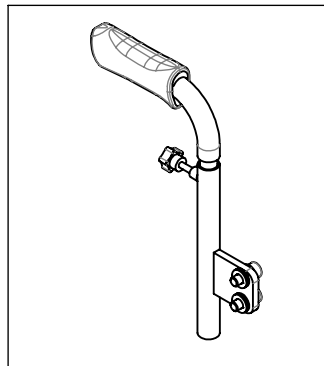


50.070.5800

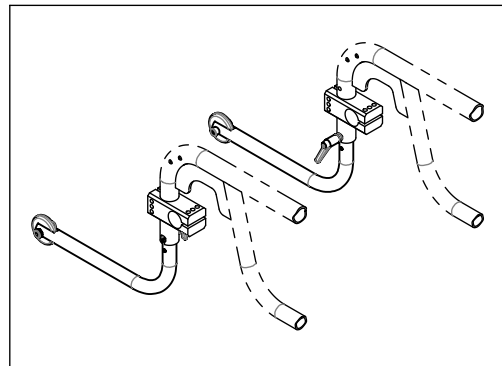


50.070.5900

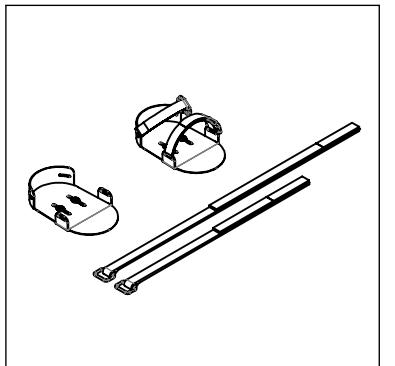


50.070.6000

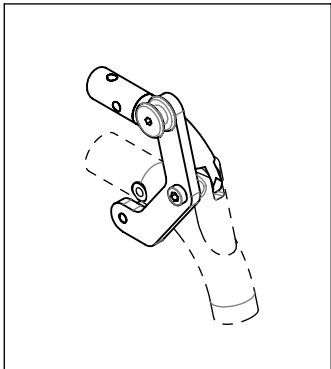


50.070.6100

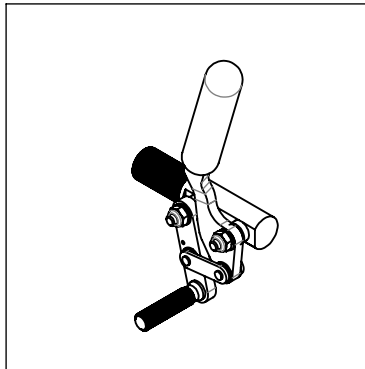


50.070.6200

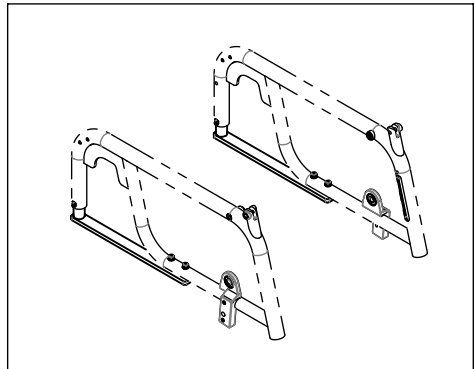


50.070.6400

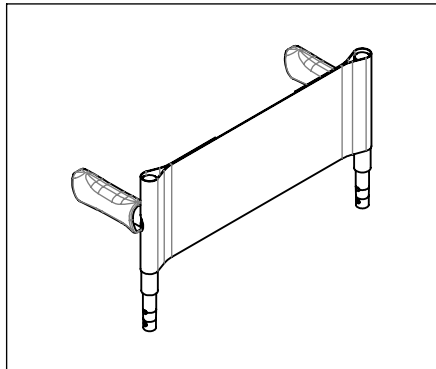


50.070.6500

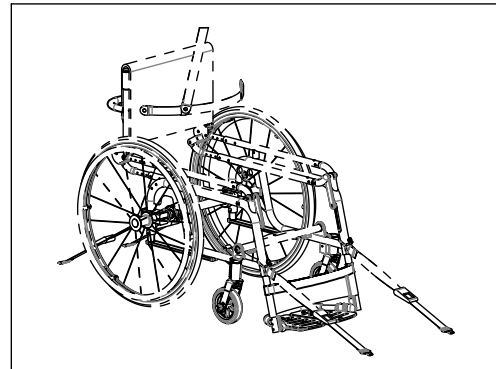


50.070.6600

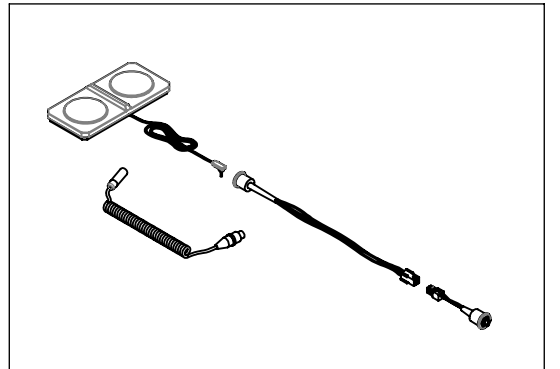


50.070.6700

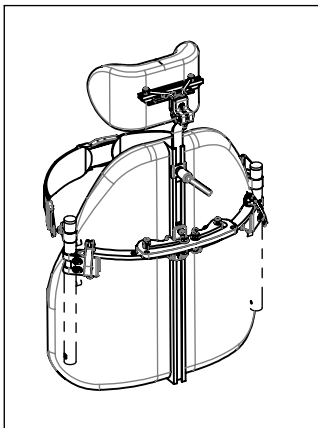

50.070.6800

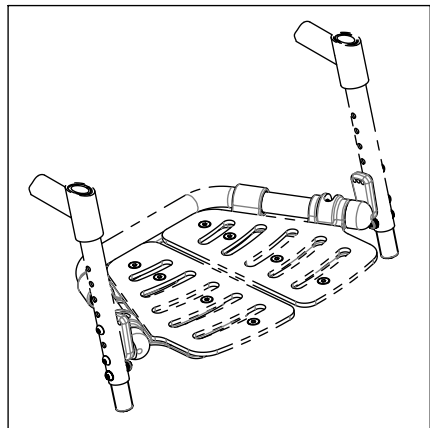

50.070.6900

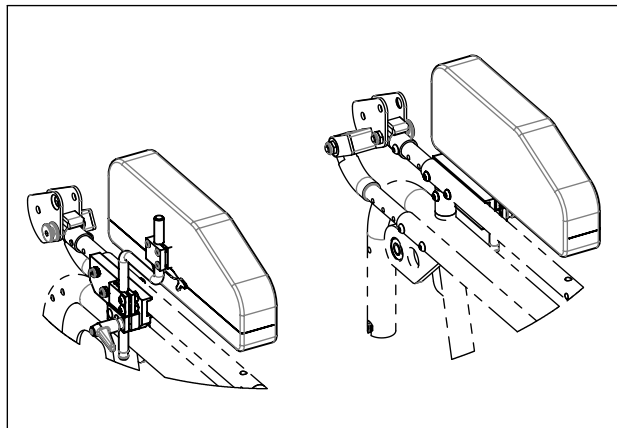

Erstellt Prepared	28.09.2007	PW
Geändert Modified	19.03.2012	PW
Gepr./Freig. Approved	19.03.2012	BM
Status	freigegeben/approved	

LEVO 
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch

Benennung / Description

Optionen & Zubehör
Overview options & accessories

Rollstuhl
Wheelchair

LCEV


Artikelnummer
Art. no.

50.070.5000

Blatt / Anz.
Sheet / no. of


1 / 1

Index / Rev.
B

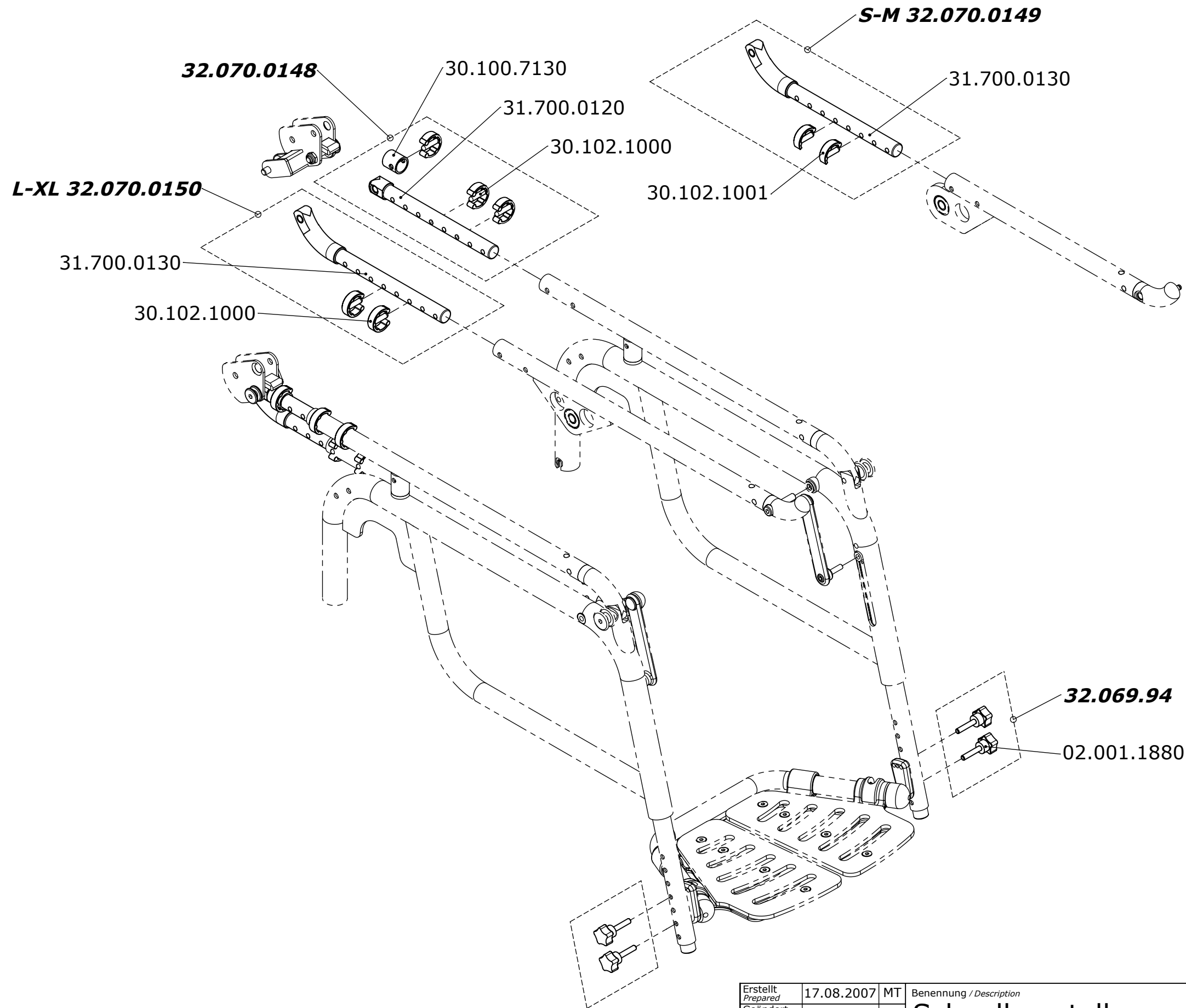


Set:
S-M 32.070.0401
L-XL 32.070.0402

Erstellt Prepared	17.08.2007	MT	Benennung / Description Schnellverstellung Quick adjustment		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved	30.04.2008	TN			
Status Status					
LEVO ⁺ LEVO AG THE EXPERTS IN STANDING CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair LCEV	Artikelnummer Art. no. 50.070.5100	

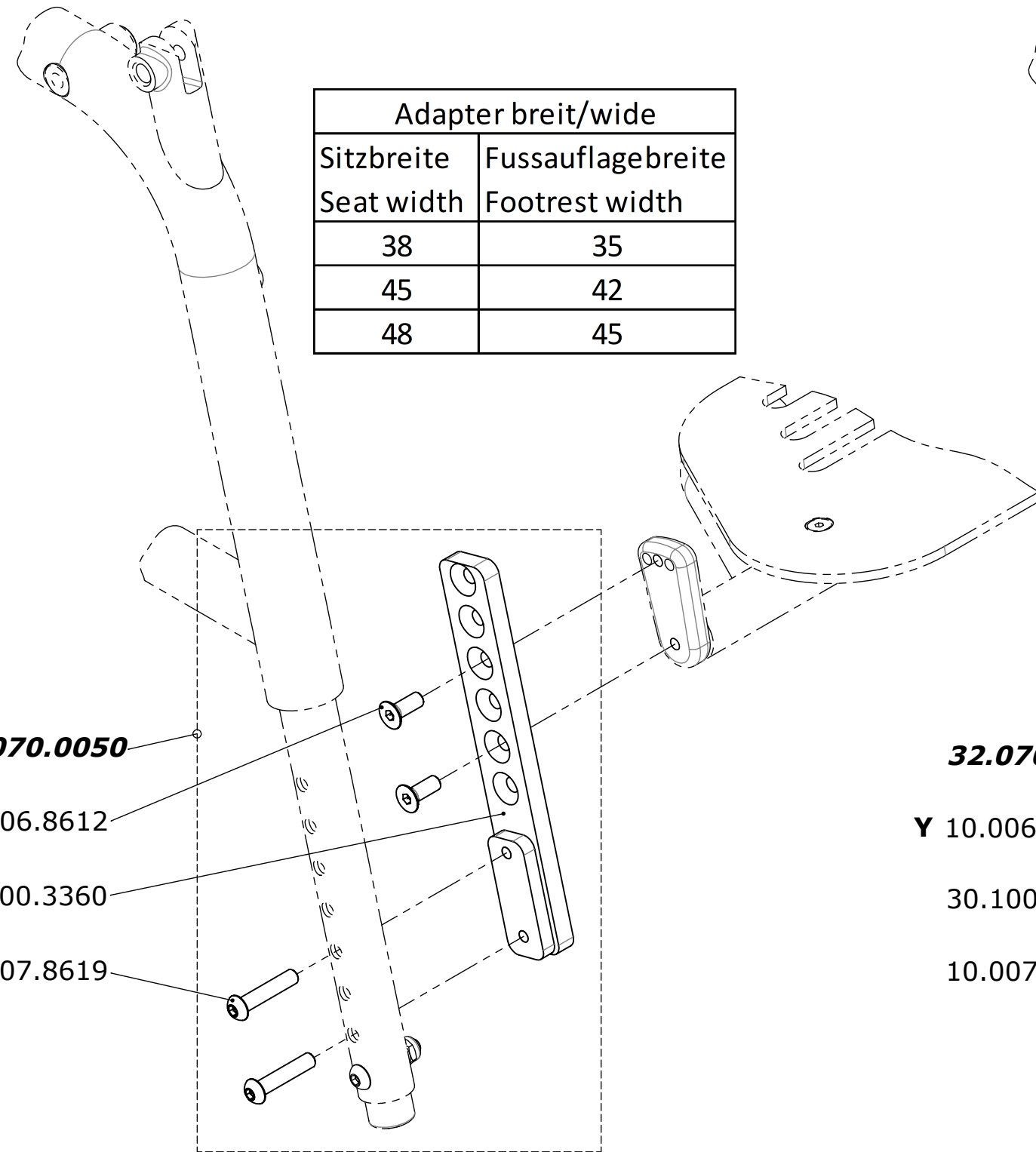

X: Für Easy transfer Fussauflage Artikel Nr. 10.006.0610
For easy transfer footrest article no. 10.006.0610

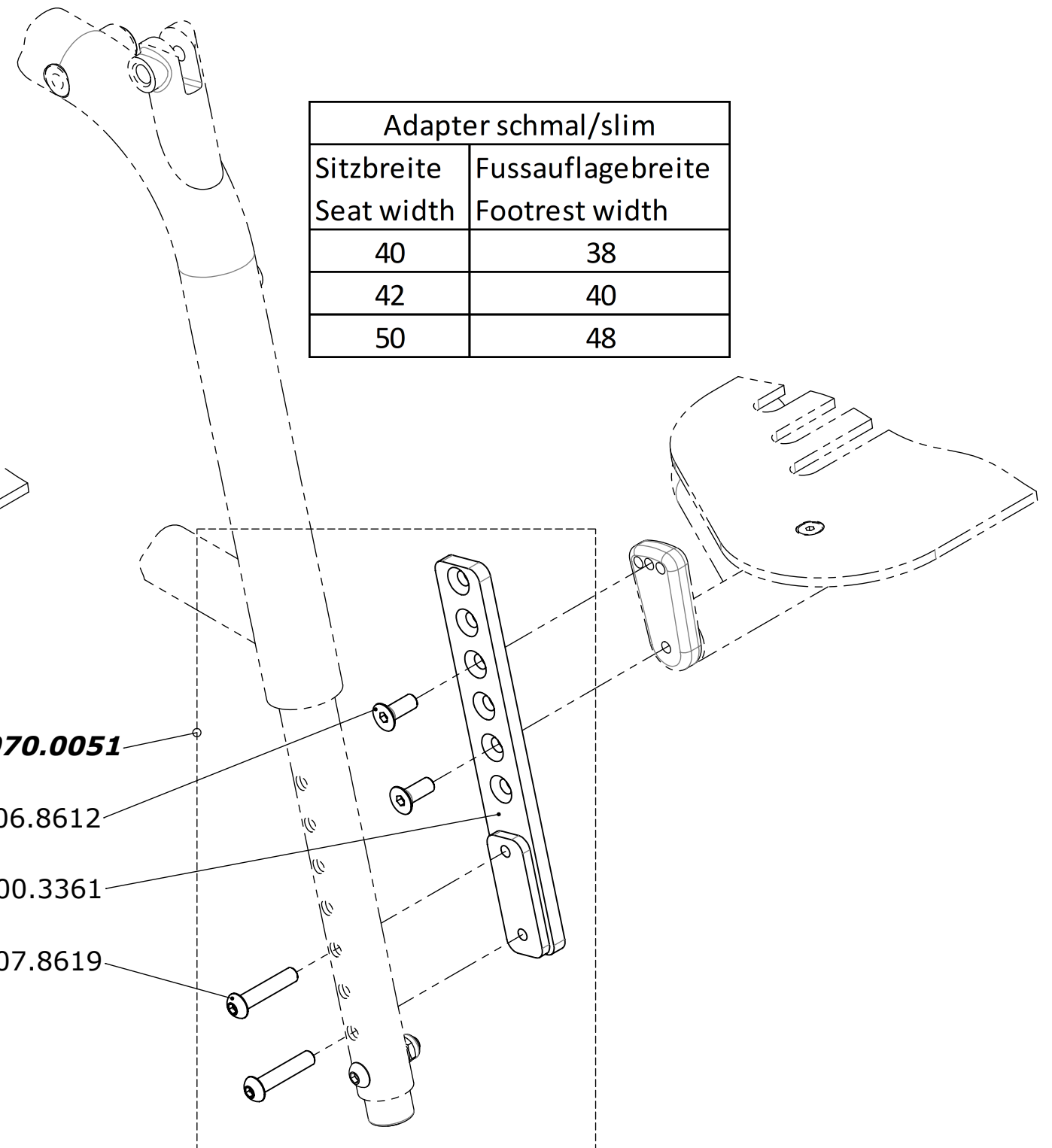



Y: Für Easy transfer Fussauflage Artikel Nr. 10.006.4609
For easy transfer footrest article no. 10.006.4609

Erstellt <i>Prepared</i>	16.08.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Fussauflagenhöhenadapter Footrest height adapter			
Geändert <i>Modified</i>	03.07.2015	PW				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	03.07.2015	FW				
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved					
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i>	
			LCEV	50.070.5200	1 / 1 Index / <i>Rev.</i> A	

Sitzbreite Seat width	
38	31.100.2610
40	31.100.2640
42	31.100.2710
45	31.100.2700
48	31.100.2650

02.001.1323

50.070.0730

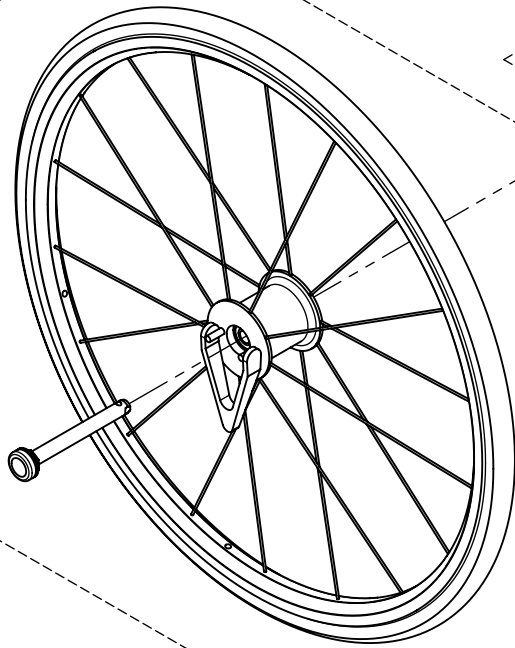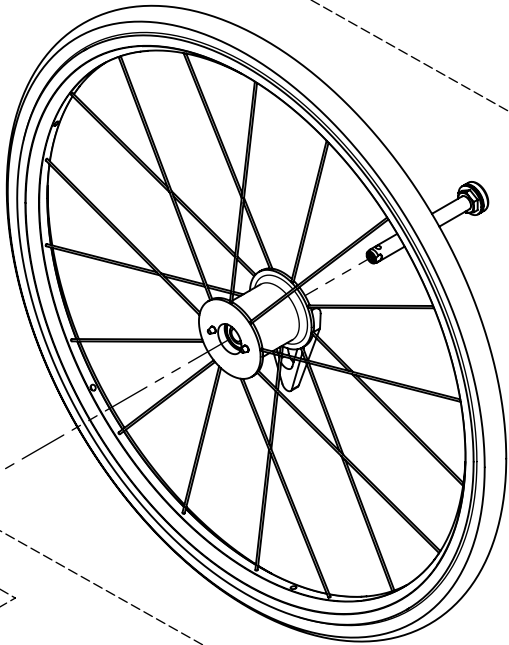

Sitzbreite Seat width	
38	32.070.0410
40	32.070.0420
42	32.070.0430
45	32.070.0440
48	32.070.0450

Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / Description Nabenfeststellbremse Hub locking brake			
Geändert <i>Modified</i>		-				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN				
Status <i>Status</i>						
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i>	
			LCEV	50.070.5300	1 / 1 Index / Rev.	

Nur Achshalter XL
Only axle holder XL

10.007.8609

30.103.2491

10.068.0100

02.010.0043

30.103.2492

links

rechts

10.007.8609

Nur Achshalter S/M/L
Only axle holder S/M/L

02.068.0120

30.100.9030

02.068.0110

10.050.0046

10.068.0100

02.010.0043

Bei Montage Gewindeschneiden M6
When mounting tapping M6

Büchse ausbohren Ø6
Drill out bushing Ø6

10.007.8618

X

20.010.0122

X (1 : 2)

02.001.1828

02.010.0042

02.010.0040

30.101.1520
Standard

30.101.0900
Hoch/High
+ 7cm

Set S/M/L	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	32.070.0531	32.070.0534
24"	32.070.0532	32.070.0535
26"	32.070.0533	32.070.0536

Set	luftbereift air tyre	pannensicher airless tyre
22"	02.010.0010	02.010.0015
24"	02.010.0020	02.010.0025
26"	02.010.0030	02.010.0035

Sitzbreite Seat width	Artikelnummer/ Article no.
35	31.700.1101
38	31.700.1102
40	31.700.1103
42	31.700.1104
45	31.700.1105
48	31.700.1106
50	31.700.1107

Erstellt Prepared	17.08.2007	BM
Geändert Modified	12.03.2020	LL
Gepr./Freig. Approved	12.03.2020	HB
Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Trommelbremse
Drum brake

LEVO ⁺
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch

Rollstuhl
Wheelchair

LCEV

Artikelnummer
Art. no.

50.070.5400


Blatt / Anz.
Sheet / no. of
1 / 1
Index / Rev.
E

Sitzbreite Seat width	
35	32.070.0139
38	32.070.0140
40	32.070.0141
42	32.070.0142
45	32.070.0143
48	32.070.0144
50	32.070.0145


Sitzbreite Seat width	
35	30.101.3656
38	30.101.3651
40	30.101.3652
42	30.101.3653
45	30.101.3654
48	30.101.3655
50	30.101.3657

30.101.3890


10.029.4416

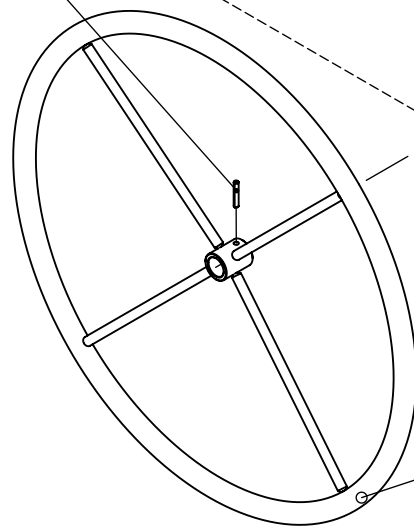

22"	30.102.0721
24"	30.102.0722
26"	30.102.0723

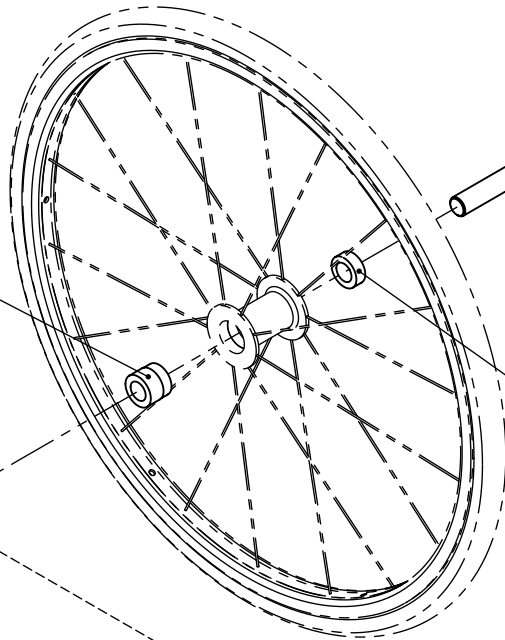


10.055.0509

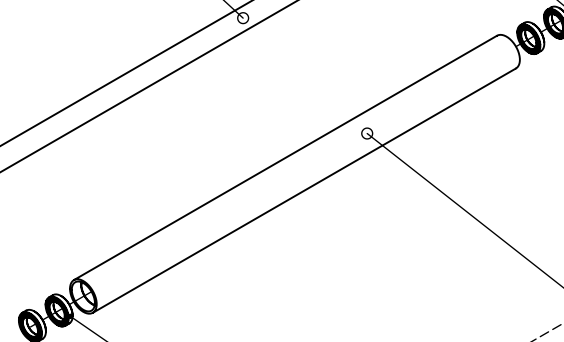

02.001.1724

30.101.3670

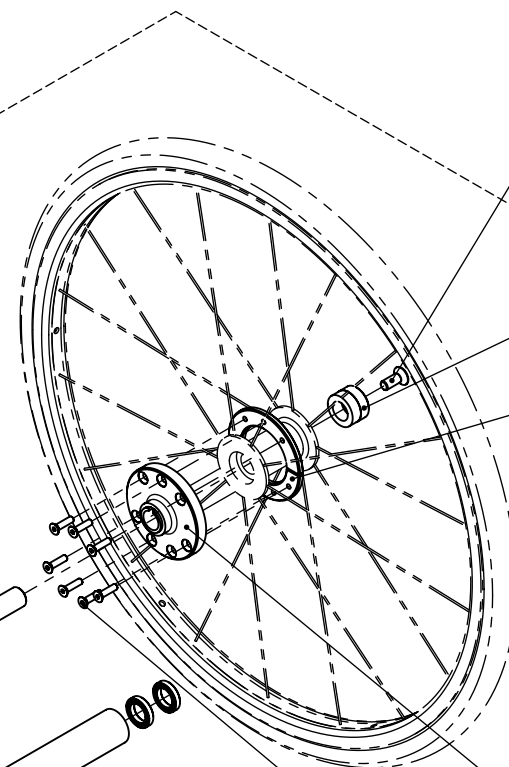

10.006.4814

30.101.4190

30.101.5720

30.101.4150

10.006.8514

Sitzbreite Seat width	
35	30.101.3696
38	30.101.3691
40	30.101.3692
42	30.101.3693
45	30.101.3694
48	30.101.3695
50	30.101.3697

Achtung: Handrad und Laufräder müssen -größenabhängig- separat bestellt werden von 50.070.0710 !
Note: Both, hand rim and main wheels need to be ordered separately and size-dependent from 50.070.0710 !

Erstellt Prepared	07.01.2019	MT
Geändert Modified	07.01.2019	PW
Gepr./Freig. Approved	07.01.2019	HB
Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Einarmantrieb
One arm drive

LEVO 
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch

Rollstuhl
Wheelchair

LCEV

Artikelnummer
Art. no.


50.070.5500

Blatt / Anz.
Sheet / no. of
1 / 2
Index / Rev.
C


22"	30.102.0721
24"	30.102.0722
26"	30.102.0723

Sitzbreite Seat width	
35	30.101.3656
38	30.101.3651
40	30.101.3652
42	30.101.3653
45	30.101.3654
48	30.101.3655
50	30.101.3657

Sitzbreite Seat width	
35	30.101.3696
38	30.101.3691
40	30.101.3692
42	30.101.3693
45	30.101.3694
48	30.101.3695
50	30.101.3697

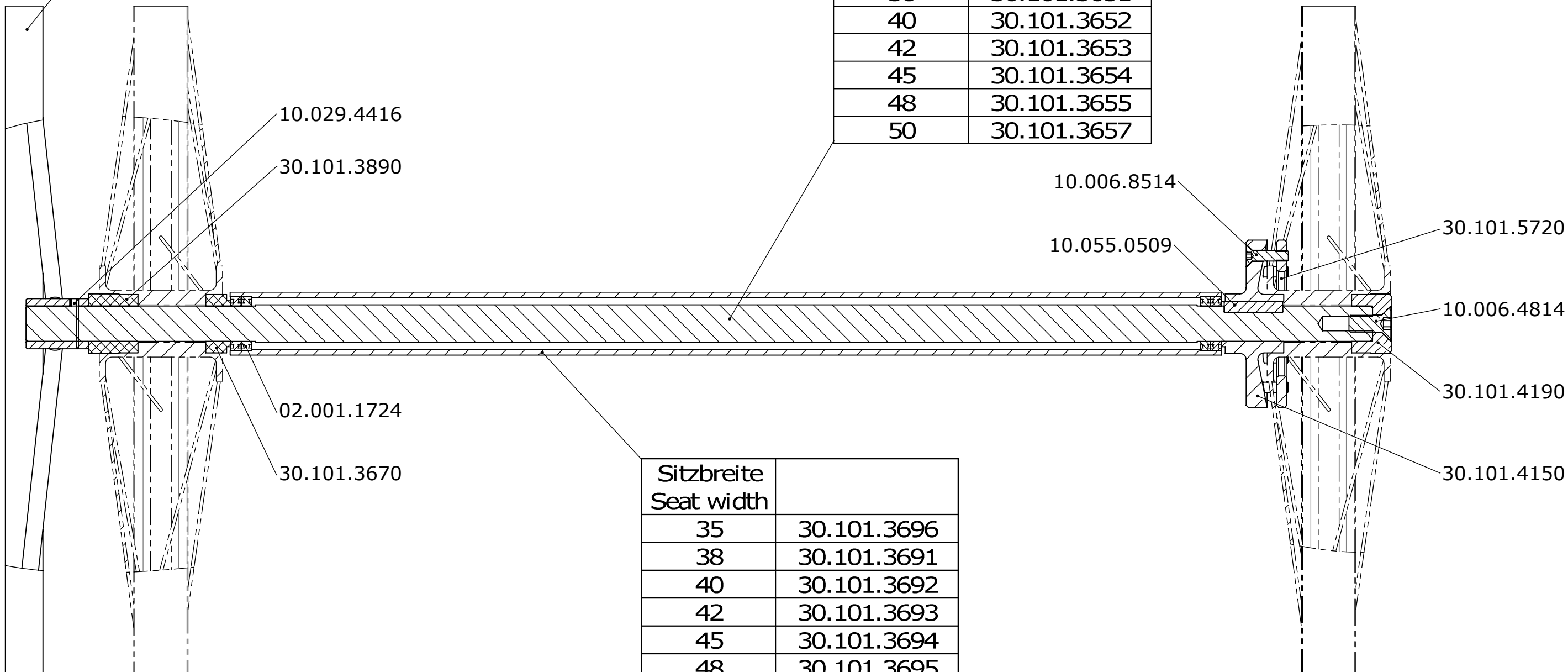


Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / Description Einarmantrieb One arm drive		
Geändert <i>Modified</i>	01.04.2014	PW			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	01.04.2014	HB			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.5500	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 2 / 2 Index / Rev. B

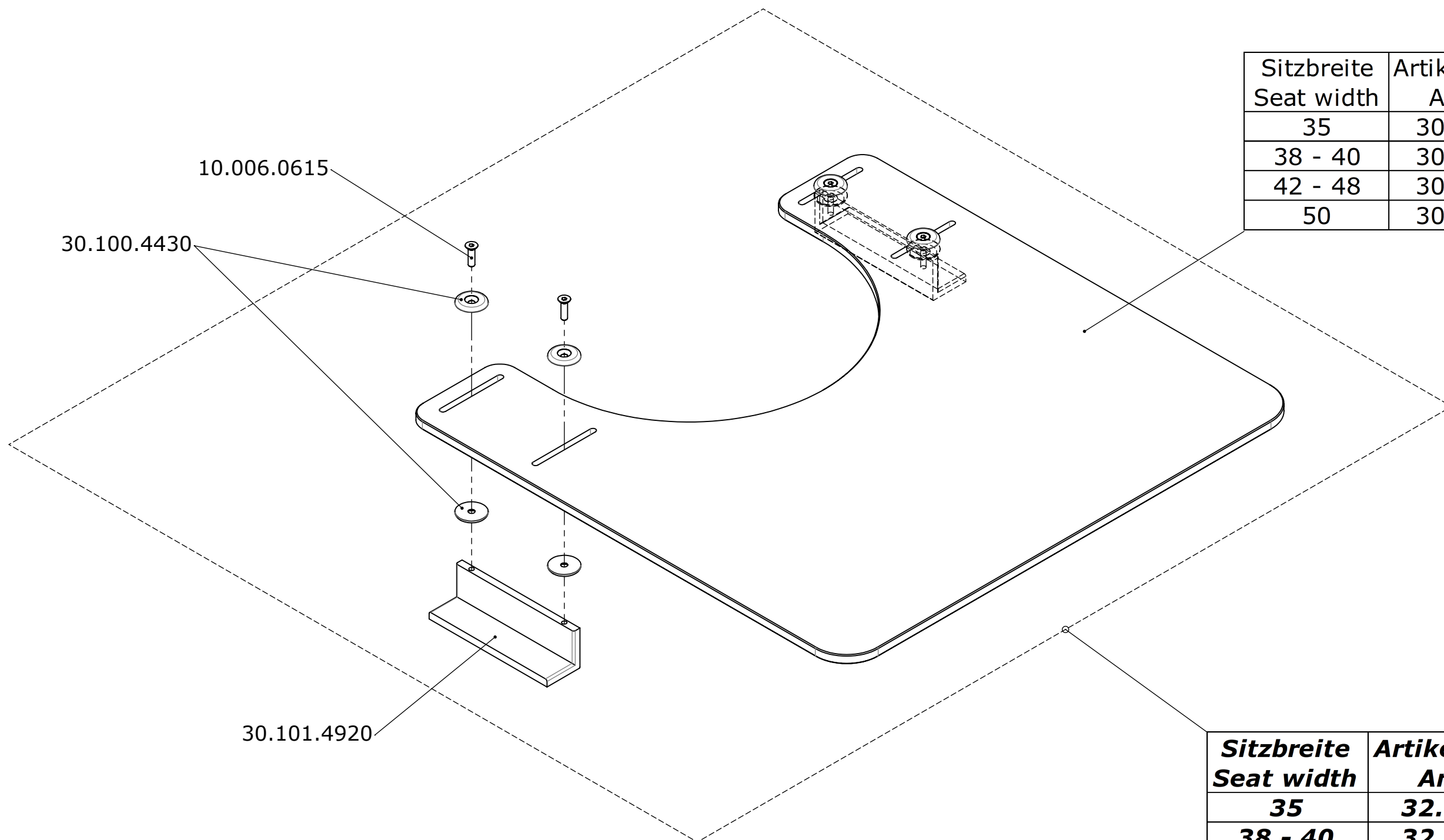


Sitzbreite Seat width	Artikelnummer / Article no.
35	30.101.5300
38 - 40	30.101.5250
42 - 48	30.101.5280
50	30.103.0490

Sitzbreite Seat width	Artikelnummer / Article no.
35	32.070.0115
38 - 40	32.070.0116
42 - 48	32.070.0117
50	32.070.0158


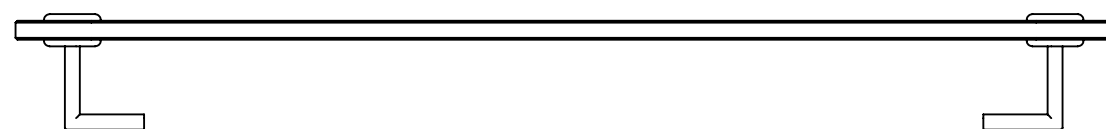


Je nach Typ kann der Halter auch nach innen gerichtet werden
Depending on the type the holder can also be directed inwards


Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / <i>Description</i> Anstecktisch Table tray			
Geändert <i>Modified</i>	05.09.2014	PW				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	05.09.2014	HB				
Status <i>Status</i>	in Bearbeitung/in process					
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.5610	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> B	

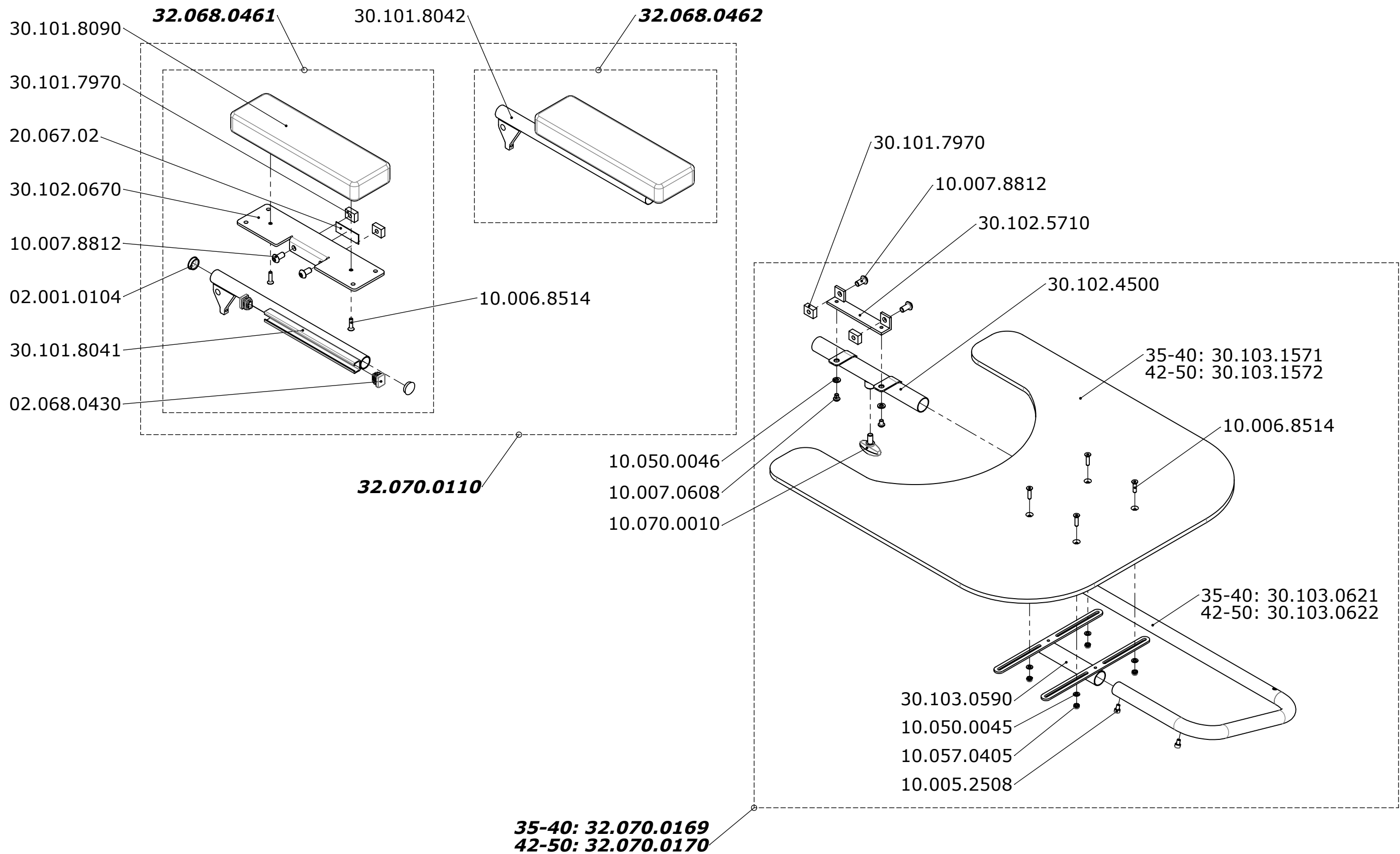

Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / <i>Description</i> Anstecktisch schwenkbar Swing away table tray		
Geändert <i>Modified</i>	05.03.2015	PW			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	05.03.2015	FW			
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved				
LEVO[®]._{dt} THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.5620
					Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> D

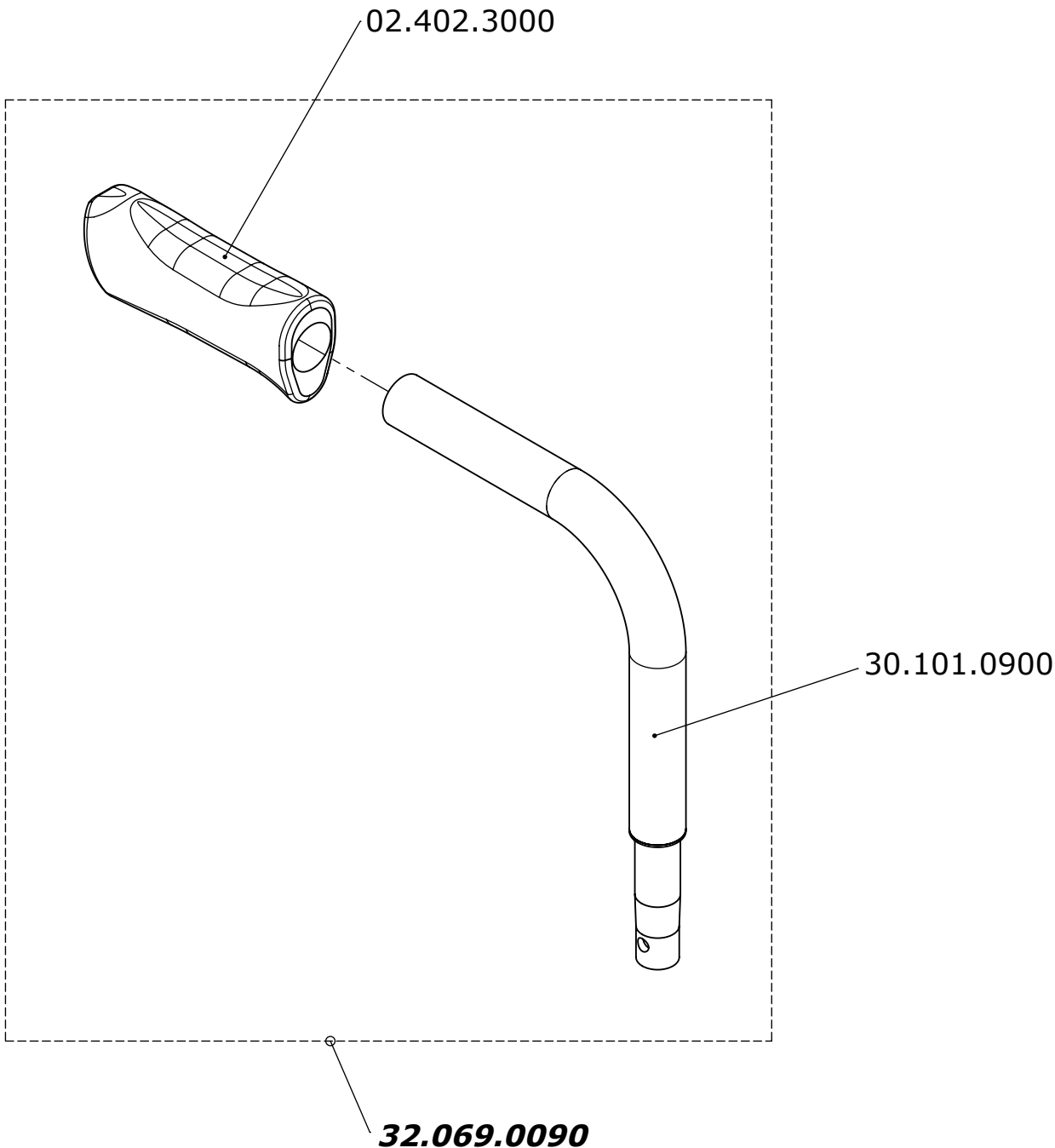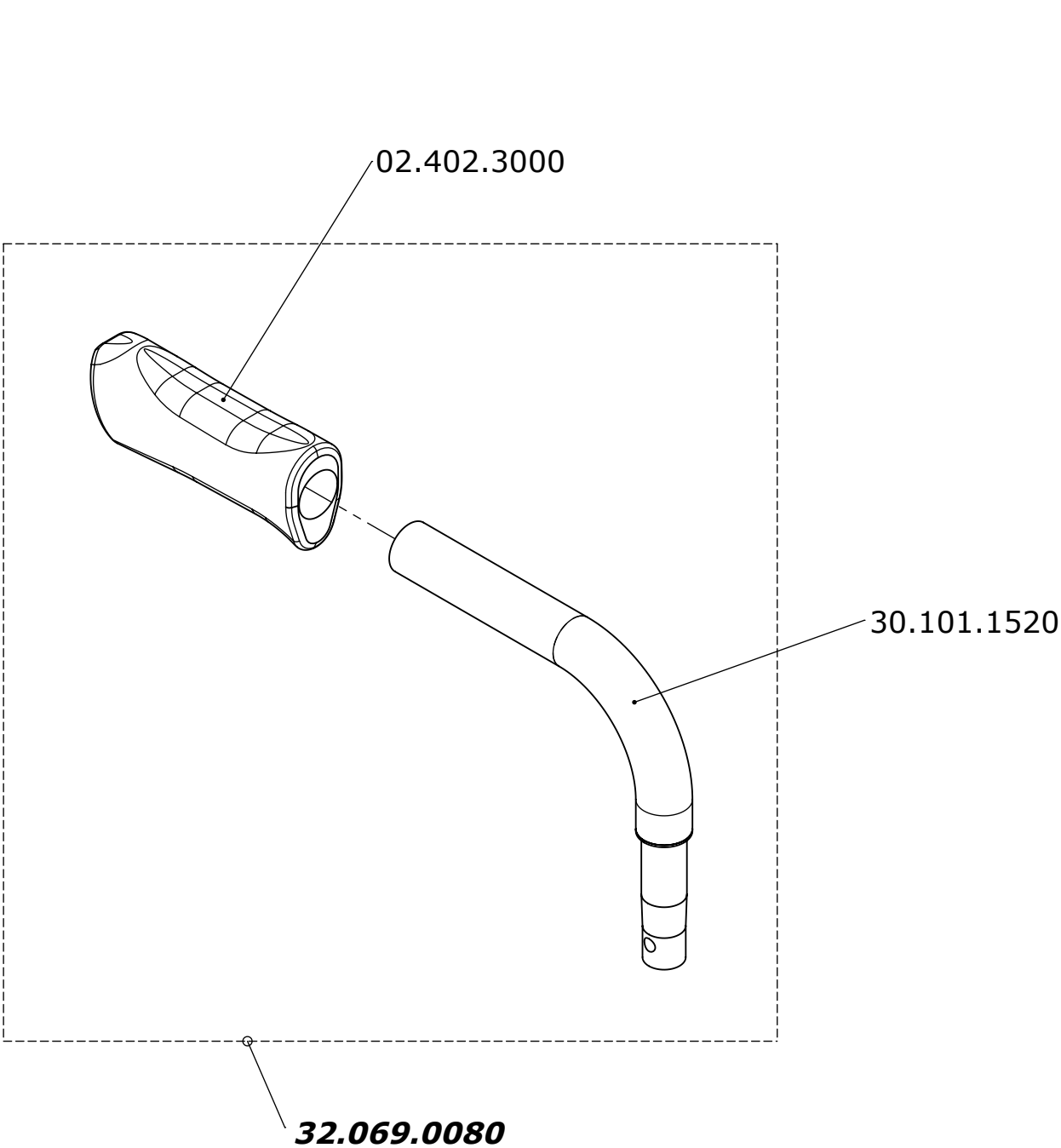

Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / Description Schiebegriffe Push handles		Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
LEVO  LEVO AG THE EXPERTS IN STANDING CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.5700	

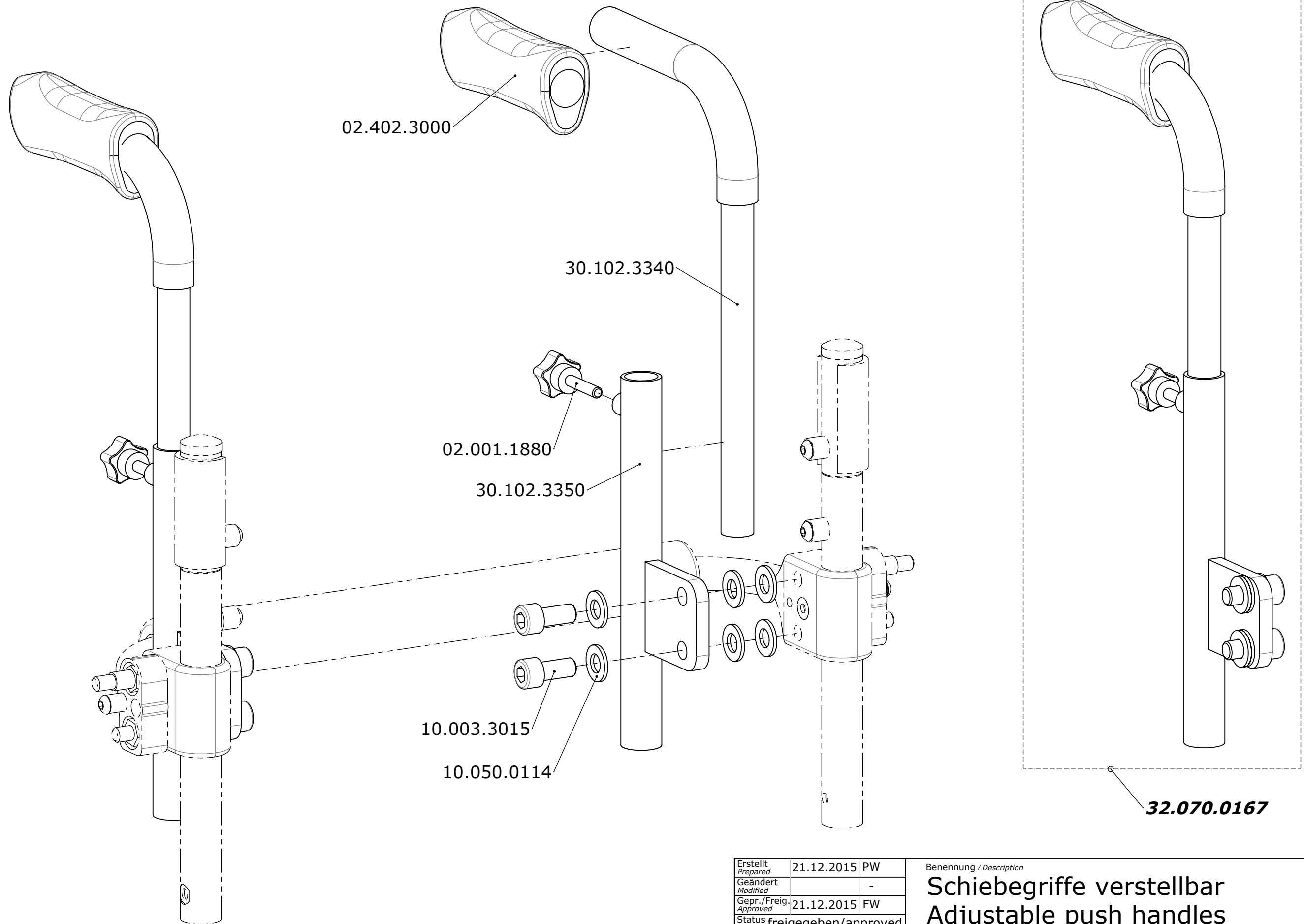

Erstellt Prepared	21.12.2015	PW
Geändert Modified		-
Gepr./Freig. Approved	21.12.2015	FW
Status Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Schiebegriffe verstellbar
Adjustable push handles

LEVO ⁺
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch

Rollstuhl
Wheelchair




LCEV

Artikelnummer
Art. no.


50.070.5710

Blatt / Anz.
Sheet / no. of

1 / 1
Index / Rev.
-

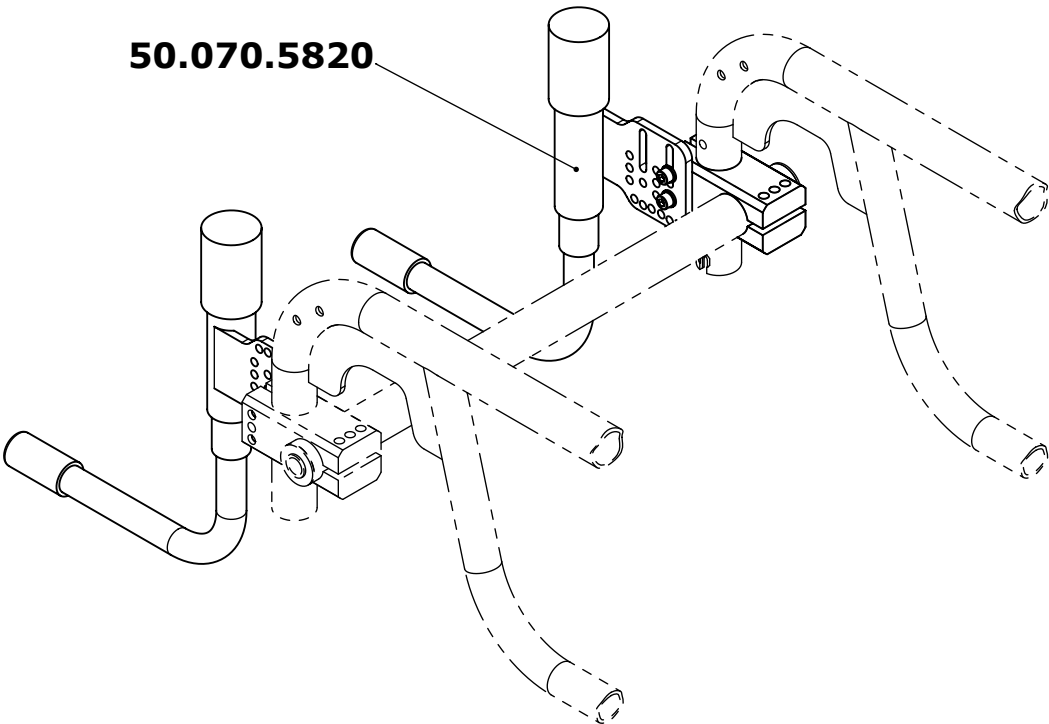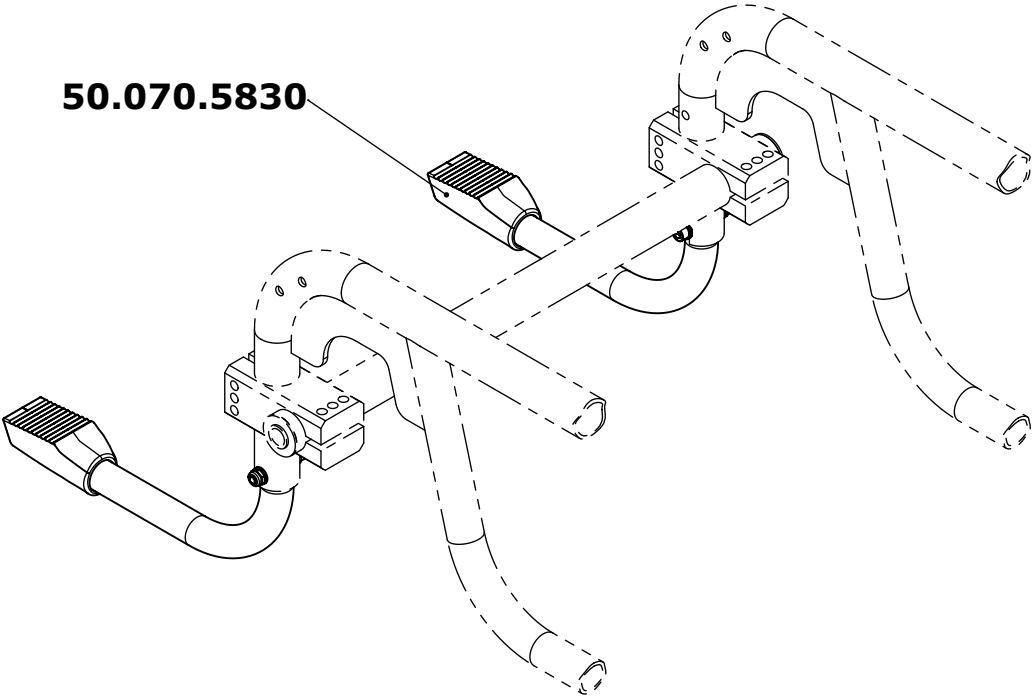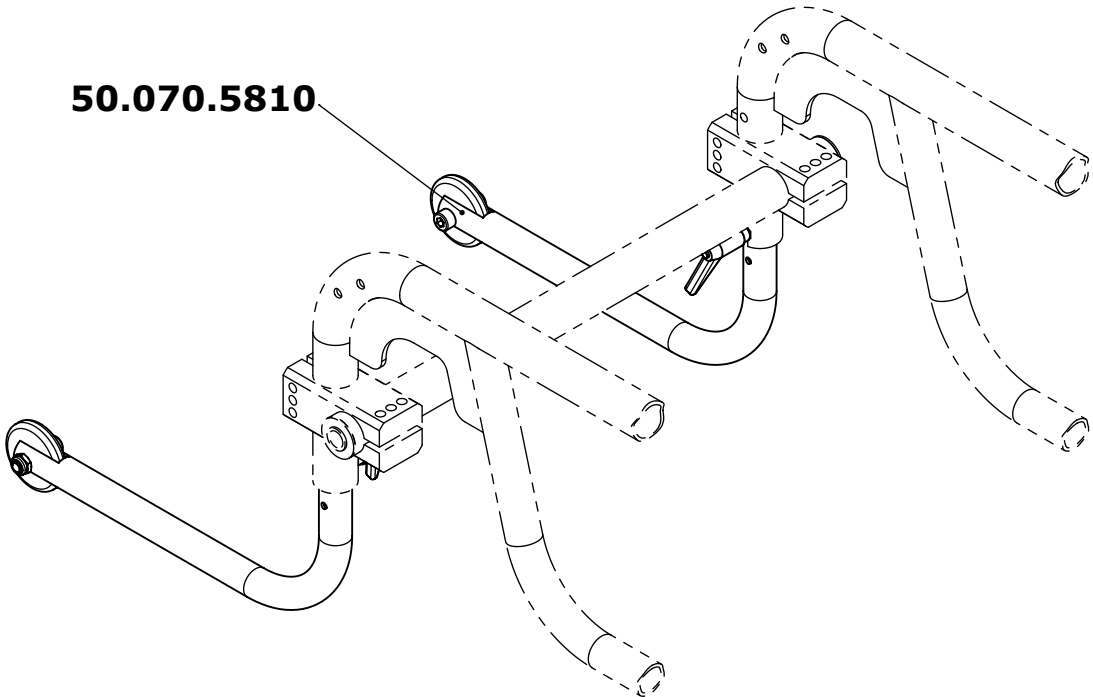


Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / Description Kippen Tip		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
LEVO  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.5800	

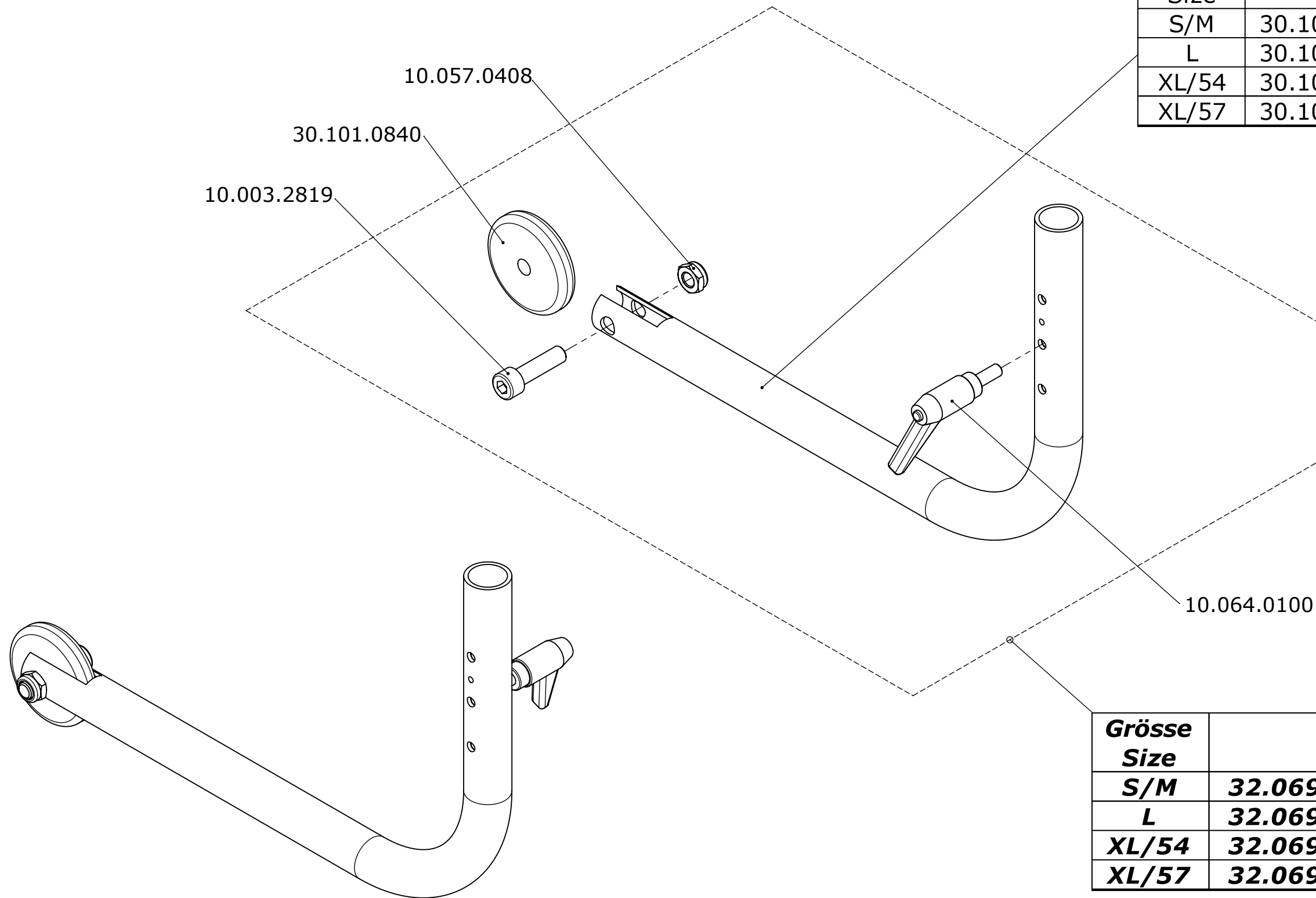


Grösse Size	
S/M	30.100.3200
L	30.100.3210
XL/54	30.100.3220
XL/57	30.100.3230

Grösse Size	
S/M	32.069.68
L	32.069.69
XL/54	32.069.70
XL/57	32.069.71


Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / Description Antikipprollen Anti-tip rolls		Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
LEVO  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.5810	

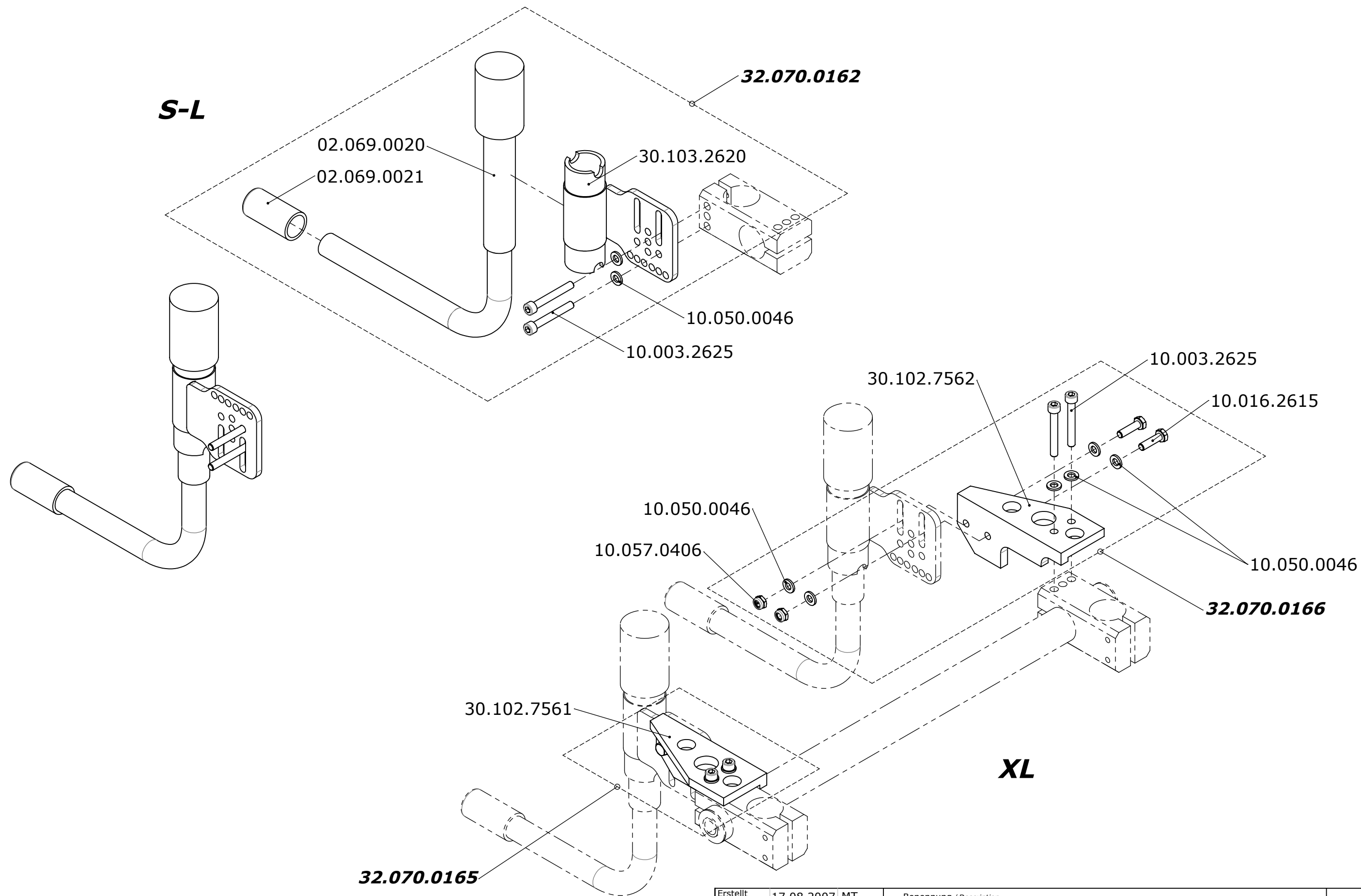


Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / <i>Description</i> Kipphilfe schwenkbar "HC" Tip aid swing away "HC"			
Geändert <i>Modified</i>	18.03.2020	PW				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	18.03.2020	HB				
Status <i>Status</i>	freigegeben/approved					
LEVO⁺.<i>ch</i> THE EXPERTS IN STANDING			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.5820	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i> A	
CH-5610 Wohlen www.levo.ch						

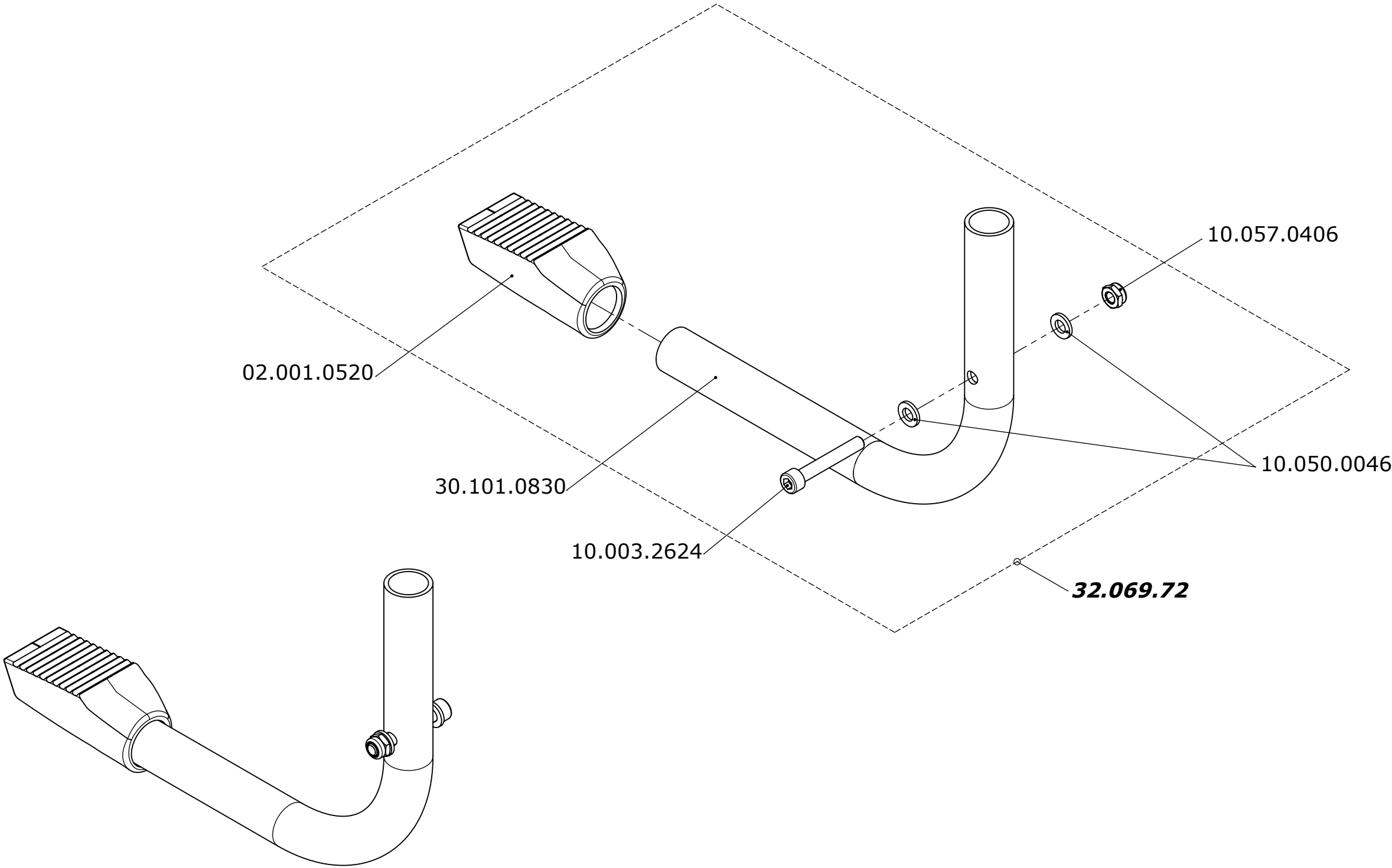


Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / Description Kipphilfe Tip aid		Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.08.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
LEVO  LEVO AG THE EXPERTS IN STANDING CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.5830	

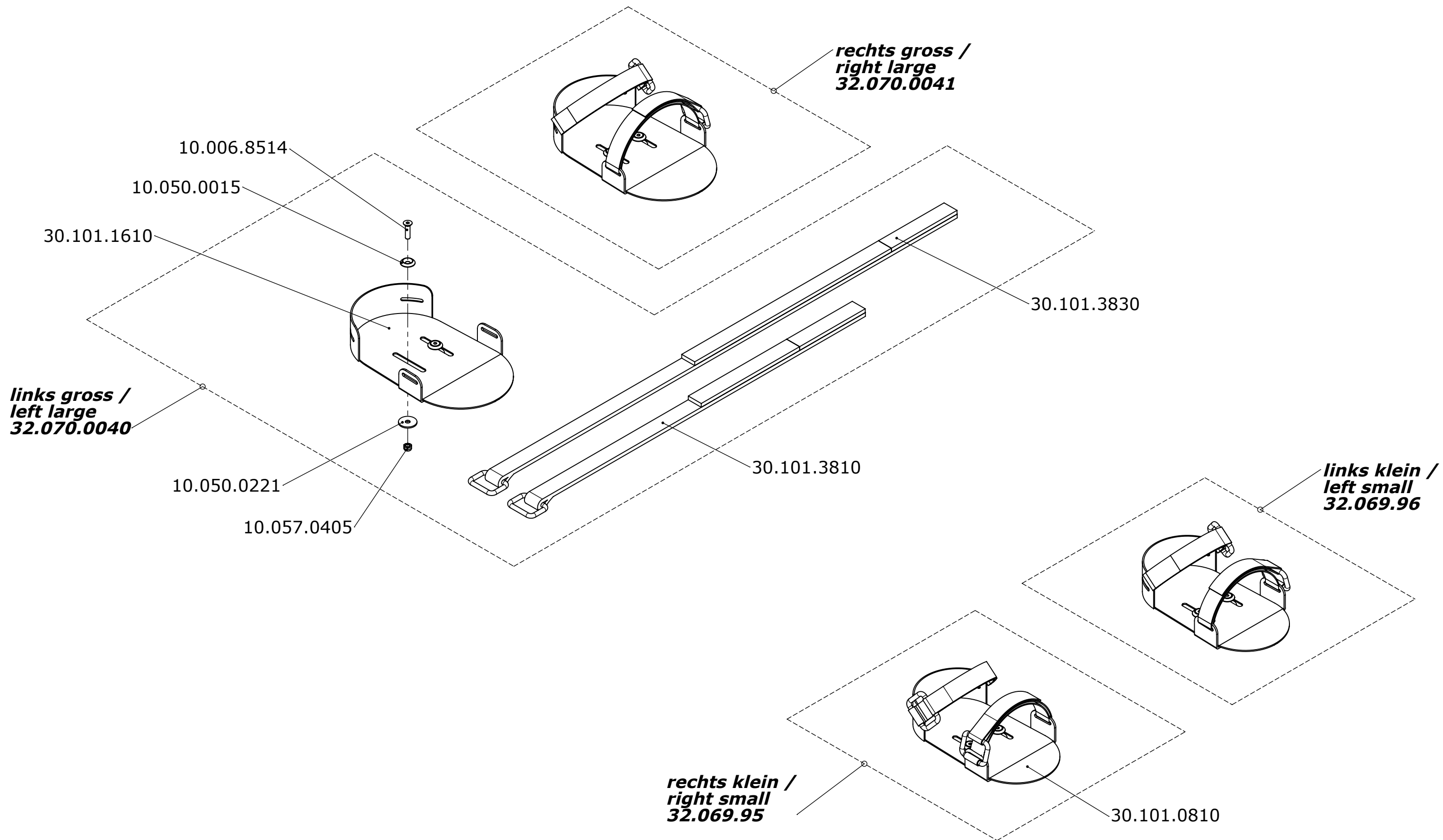


Erstellt <i>Prepared</i>	17.08.2007	MT	Benennung / Description Fussführung Foot guide			
Geändert <i>Modified</i>		-				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN				
Status <i>Status</i>						
LEVO[®]._{dt} THE EXPERTS IN STANDING			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.5900	Blatt / Anz	
					Sheet / no. of	
					1 / 1	
					Index / Rev.	

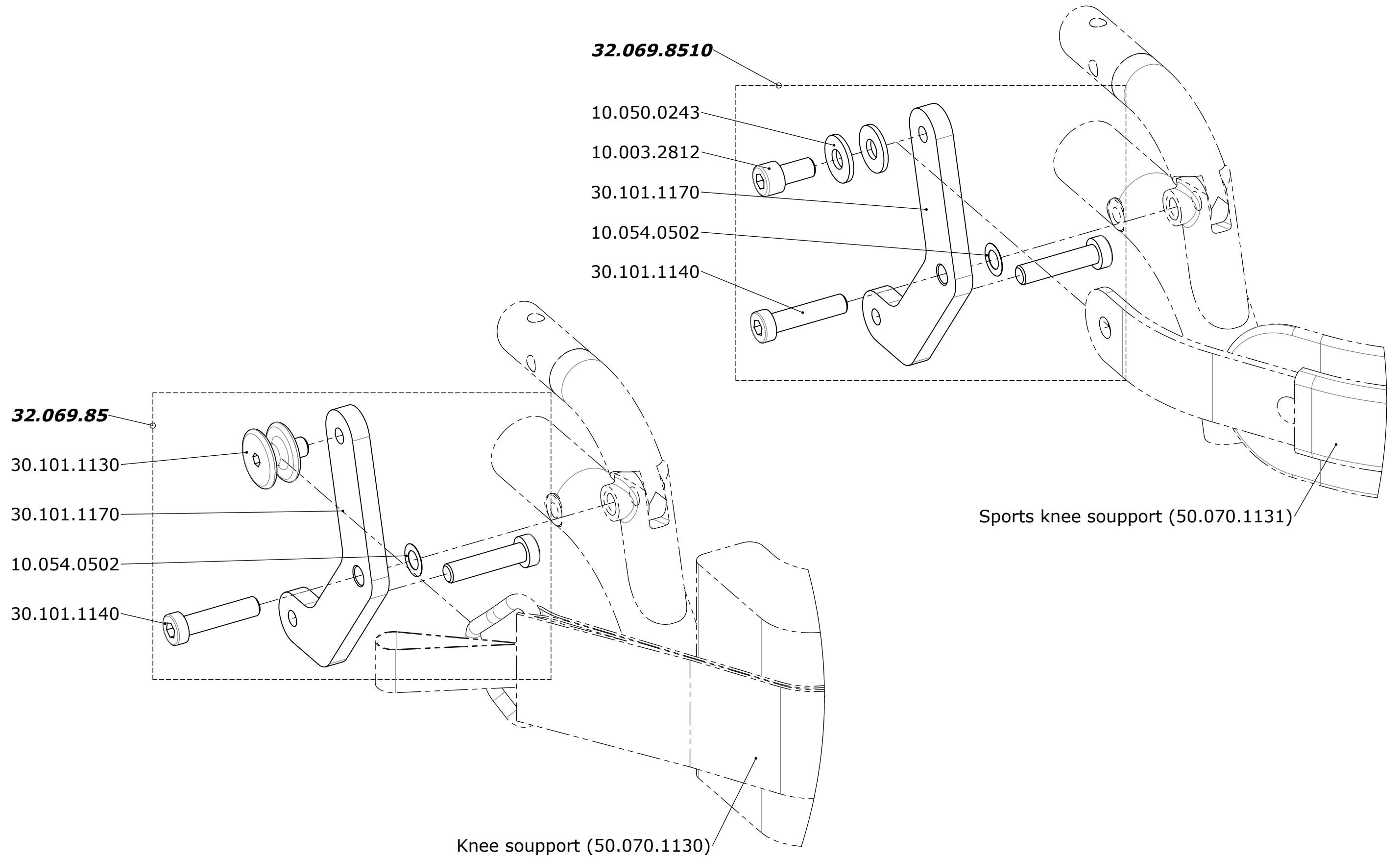


Erstellt <i>Prepared</i>		13.05.2008	PW	Benennung / <i>Description</i> Kniehalterhöhenadapter Knee support height adapter		
Geändert <i>Modified</i>		19.08.2015	PW			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		19.08.2015	FW			
Status <i>Status</i>		freigegeben/approved				
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch				Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i>
				LCEV	50.070.6000	1 / 1 Index / <i>Rev</i> B

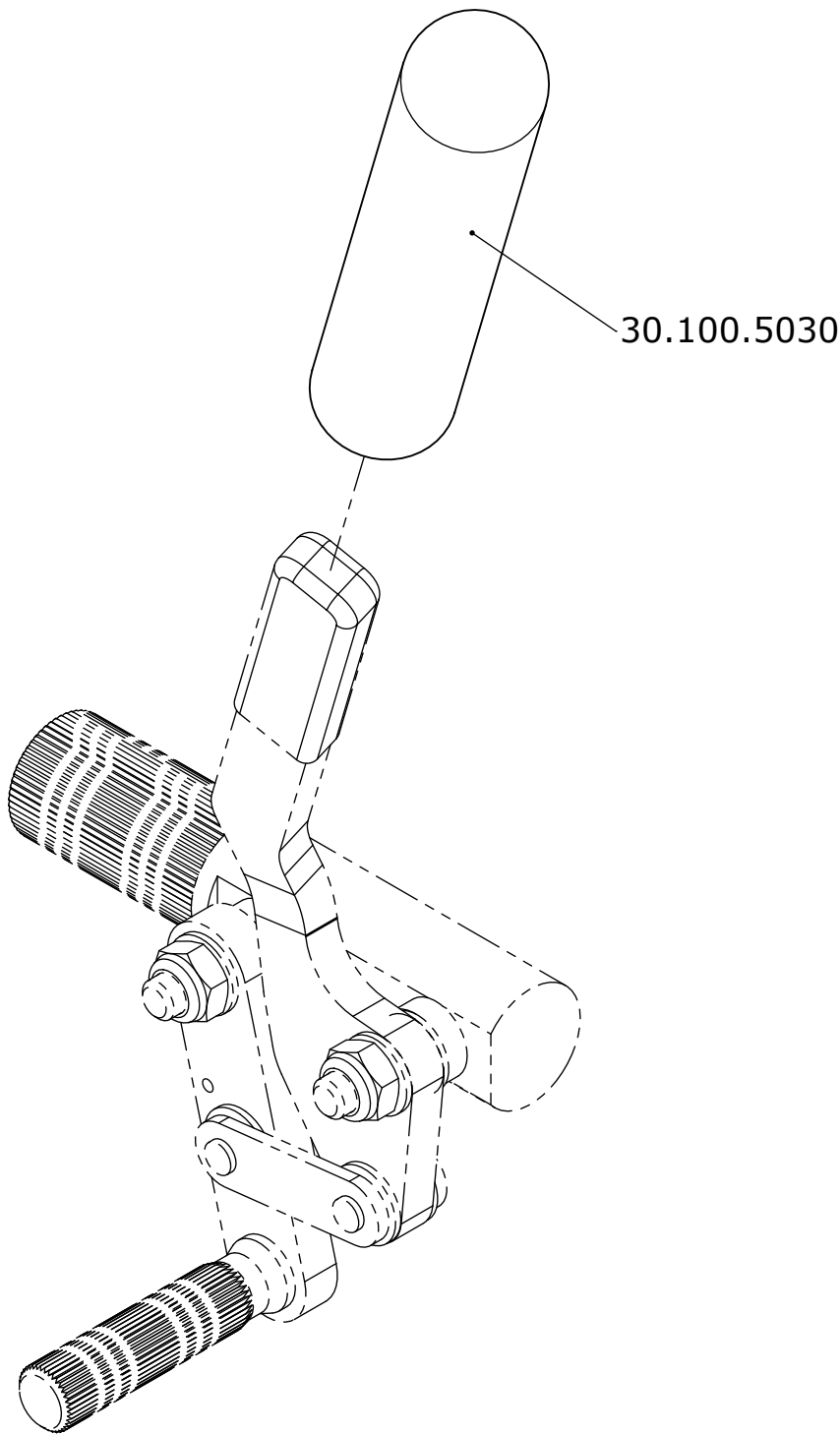

Erstellt <i>Prepared</i>	14.08.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Bremshebelverlängerung Brake lever extension		Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i>
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			
Status <i>Status</i>					
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> LCEV	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.070.6100	

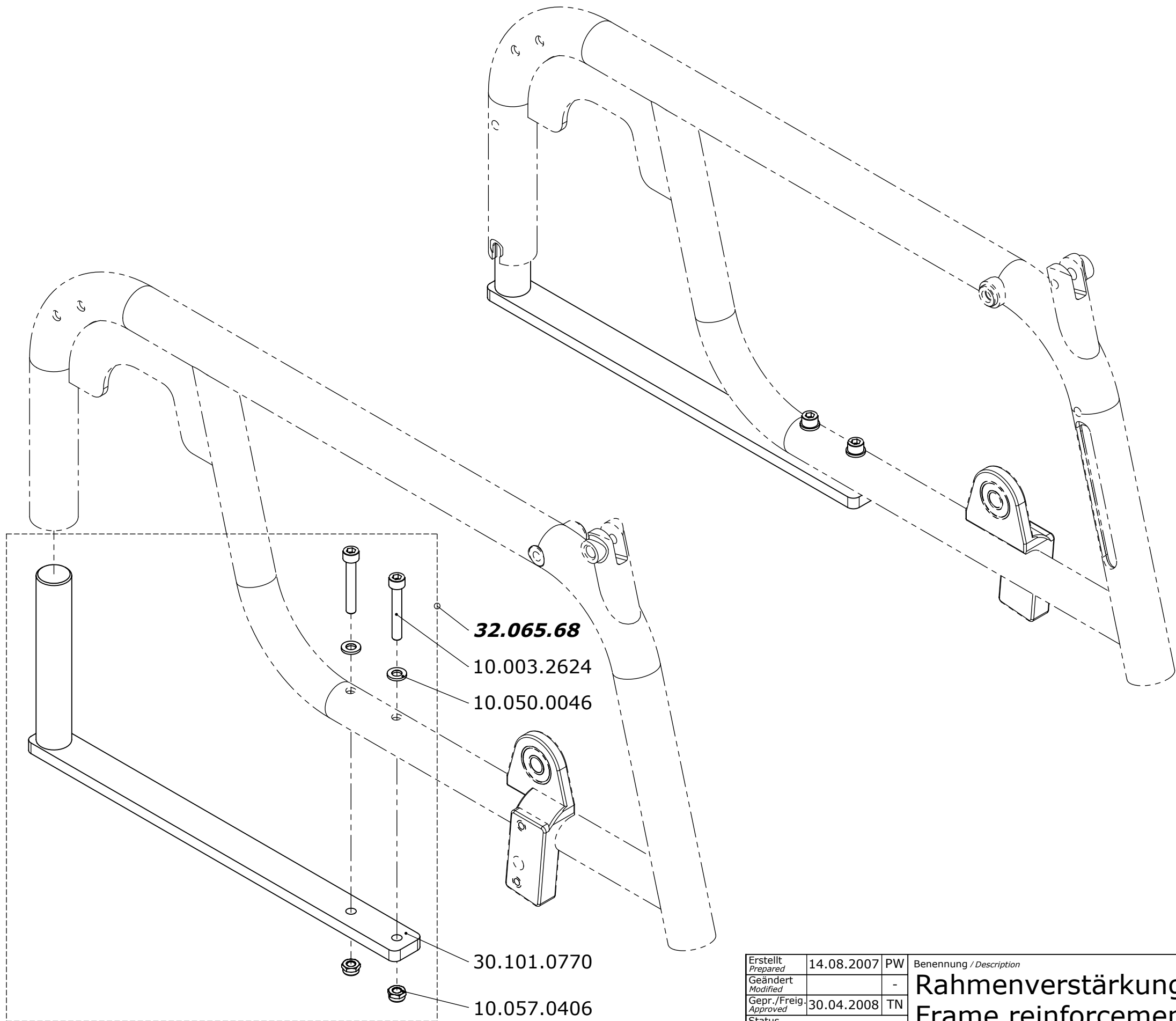


Erstellt <i>Prepared</i>	14.08.2007	PW	Benennung / <i>Description</i> Rahmenverstärkung für e-fix Frame reinforcement for e-fix		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>	30.04.2008	TN			Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i>
Status <i>Status</i>					
  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch LCEV <td> Rollstuhl <i>Wheelchair</i> 50.070.6200 </td> <td> Artikelnummer <i>Art. no.</i> </td>			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> 50.070.6200	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	

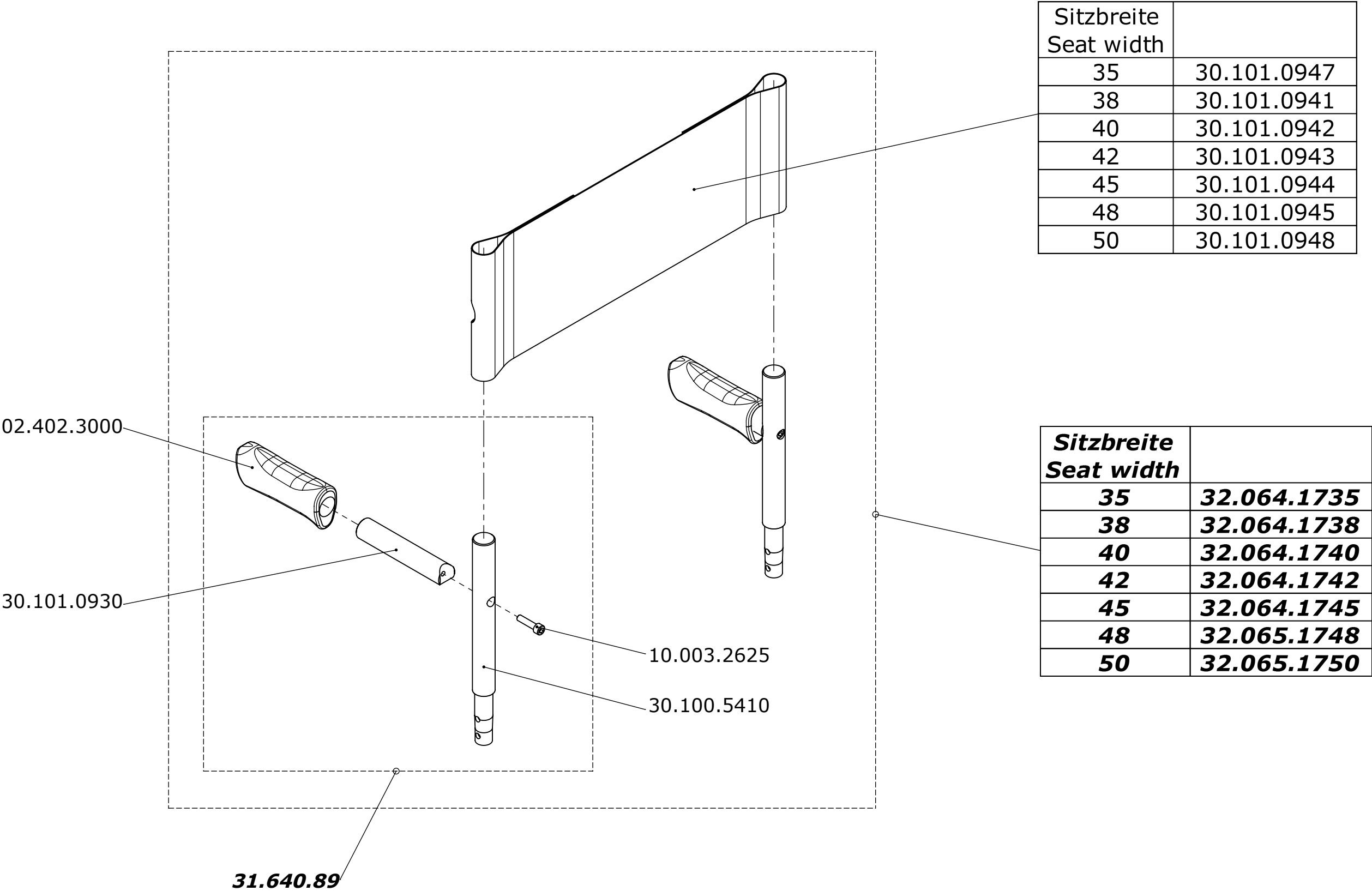


Erstellt Prepared	30.08.2007	PW	Benennung / Description Rückensysteme Backrest systems		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig Approved	30.04.2008	TN			
Status Status					
LEVO dt LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair LCEV	Artikelnummer Art. no. 50.070.6400	

* nicht im Lieferumfang
not included in our shipment

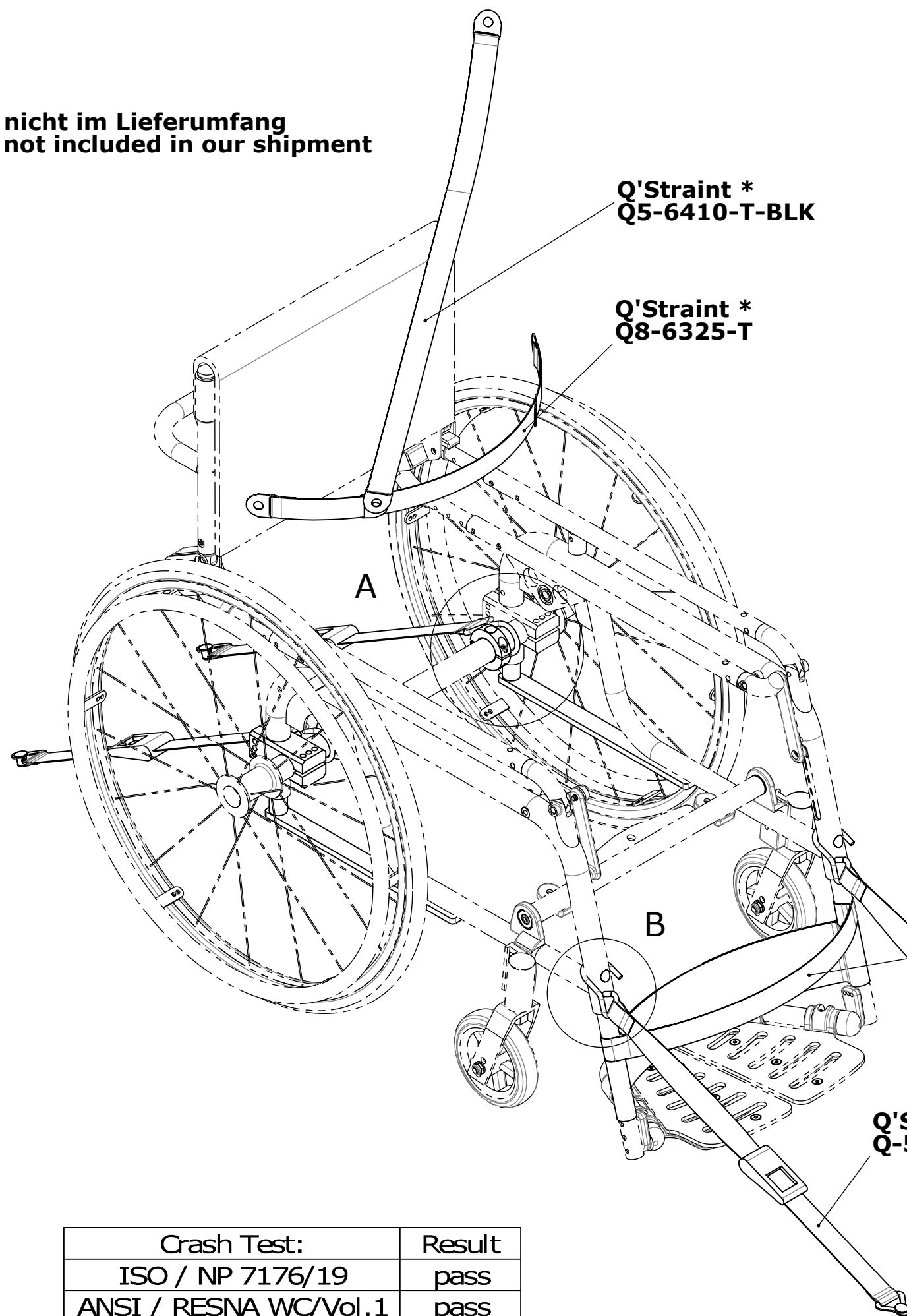


A (1 : 2)

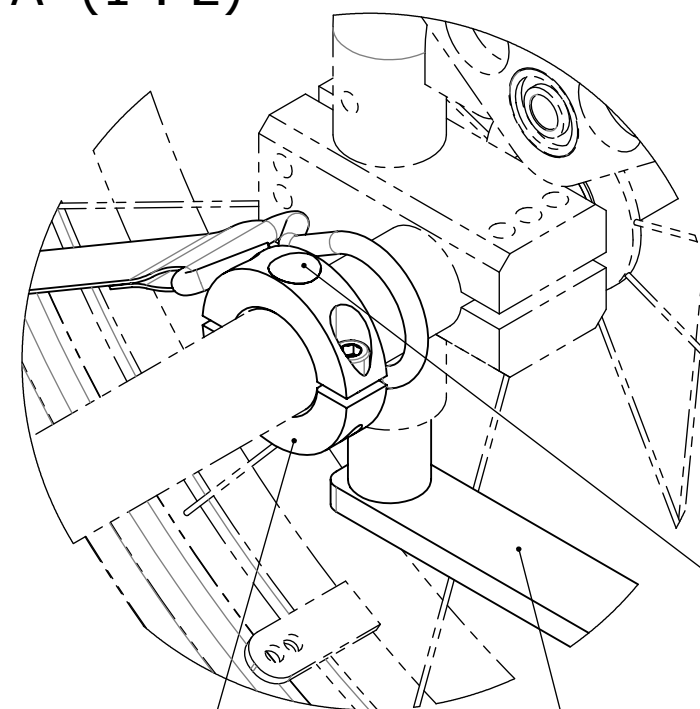

02.001.0706

50.070.6200
(32.065.68)

B (1 : 2)

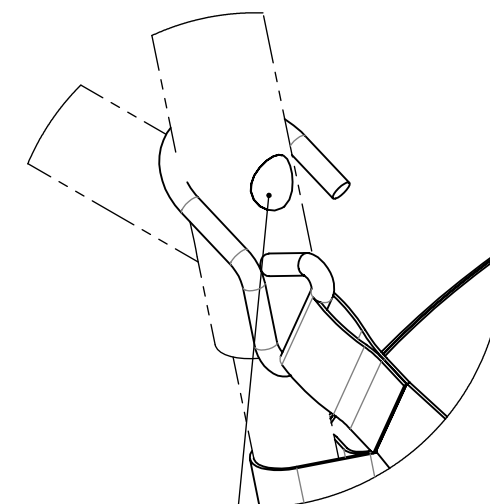

30.103.0650

Sitzbreite Seat width	
35	30.100.7701
38	30.100.7702
40 - 42	30.100.7703
45	30.100.7704
48	30.100.7705
50	30.100.7706

Set Transporthalterung Tiedown-Set	
Sitzbreite Seat	Artikelnummer Article-no.
35	32.070.0501
38	32.070.0502
40 - 42	32.070.0503
45	32.070.0504
48	32.070.0505
50	32.070.0506

Crash Test:	Result
ISO / NP 7176/19	pass
ANSI / RESNA WC/Vol.1	pass

Erstellt Prepared	25.05.2007	PW
Geändert Modified	04.12.2013	PW
Gepr./Freig. Approved	04.12.2013	FW
Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Set Transporthalterung
Tiedown-Set

LEVO ^{dt} **AG**
THE EXPERTS IN STANDING

CH-5610 Wohlen
www.levo.ch

Rollstuhl
Wheelchair

LCEV


Artikelnummer
Art. no.

50.070.6500

Blatt / Anz.
Sheet / no. of

1 / 1


Index / Rev.
A

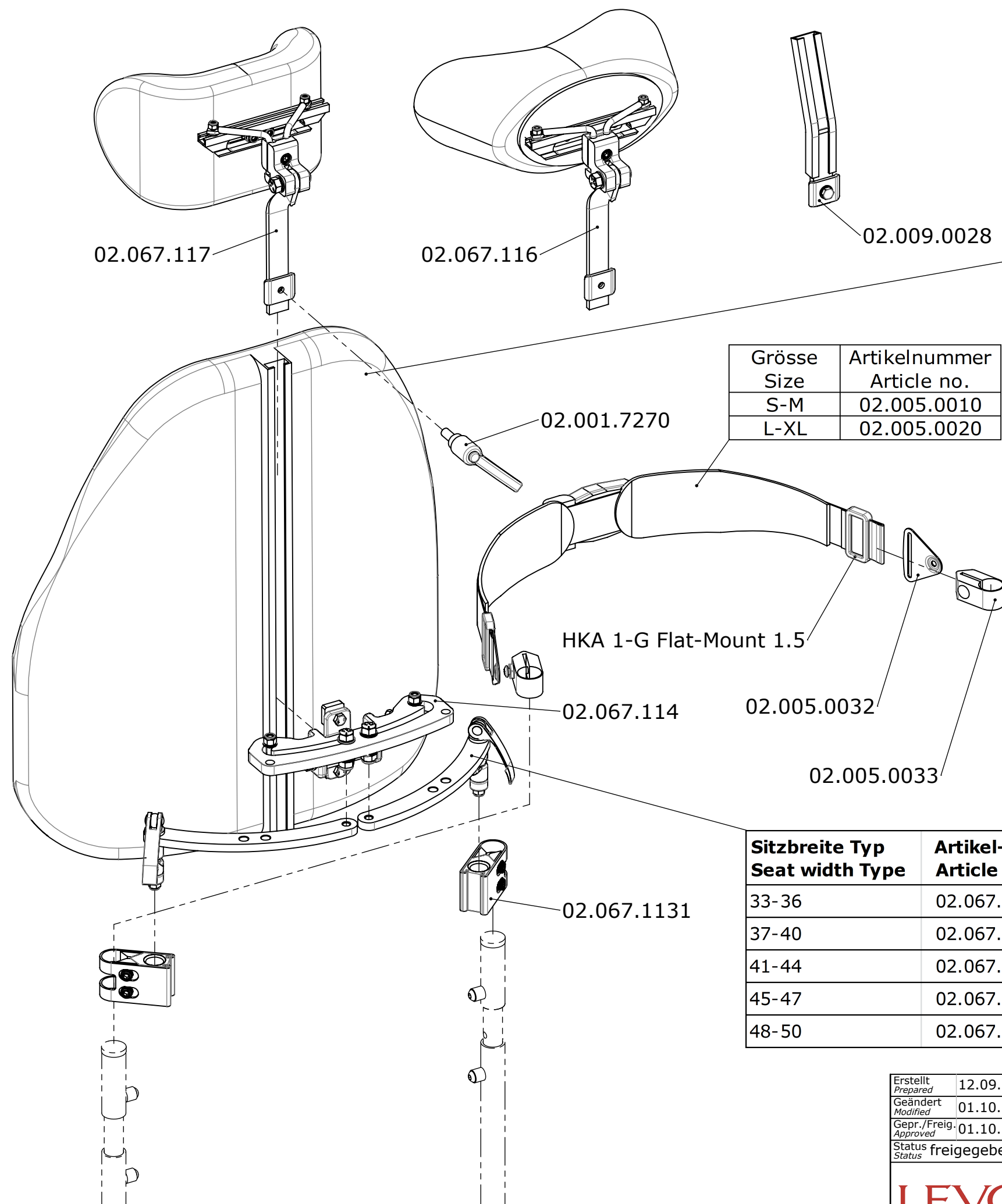

Grösse Size	Artikelnummer Article no.
S-M	02.005.0010
L-XL	02.005.0020

Sitzbreite Seat width	Rücken Typ Backrest Type	Artikel-Nr. Article no.	Bezeichnung V-Trak AXXIS	Description V-Trak AXXIS
35	26-33	02.009.0100	Niedrig	Low
38 / 40	30-38 M	02.009.0101	Niedrig	Low
42 / 45	40/44 L	02.009.0102	Niedrig	Low
48 / 50	48-52 XL	02.009.0103	Niedrig	Low
38 / 40	30-38 M	02.009.0110	Hoch	High
42 / 45	40/44 L	02.009.0111	Hoch	High
48 / 50	48-52 XL	02.009.0112	Hoch	High
35	30-38 S	02.009.0100	Reduziert	Reduced
38 / 40	30-38 M	02.009.0116	Reduziert	Reduced
42 / 45	40/44 L	02.009.0117	Reduziert	Reduced
48 / 50	48-52 XL	02.009.0118	Reduziert	Reduced
35 / 38	M Deep contour	02.009.0051	Hoch	High
40 / 42 / 45	L Deep contour	02.009.0052	Hoch	High
48 / 50	XL Deep contour	02.009.0053	Hoch	High
35 / 38	M Deep contour	02.009.0055	Reduziert hoch	Reduced high
40 / 42 / 45	L Deep contour	02.009.0056	Reduziert hoch	Reduced high
48 / 50	XL Deep contour	02.009.0057	Reduziert hoch	Reduced high

Sitzbreite Typ Seat width Type	Artikel-Nr. Article no.
33-36	02.067.107
37-40	02.067.108
41-44	02.067.109
45-47	02.067.110
48-50	02.067.111

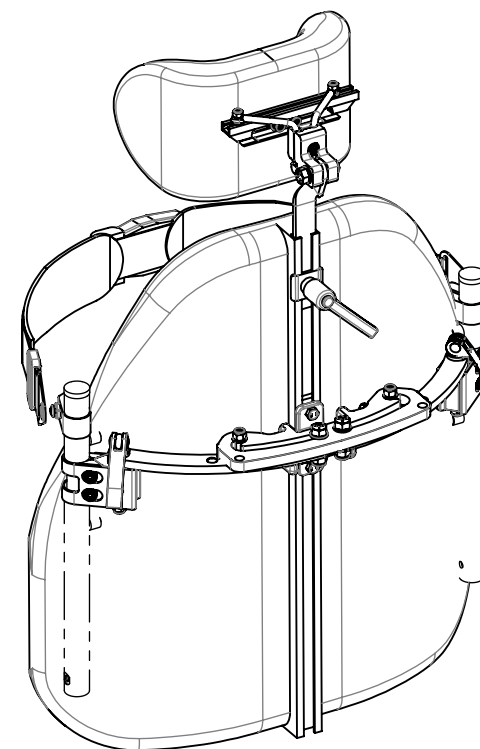

Erstellt Prepared	12.09.2016	PW
Geändert Modified	01.10.2018	PW
Gepr./Freig. Approved	01.10.2018	FW
Status Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

V-Track Rücken
V-Track backrest

LEVO 
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch


Rollstuhl
Wheelchair

LCEV



Artikelnummer
Art. no.

50.070.6700


Blatt / Anz.
Sheet / no. of
1 / 1
Index / Rev.
A

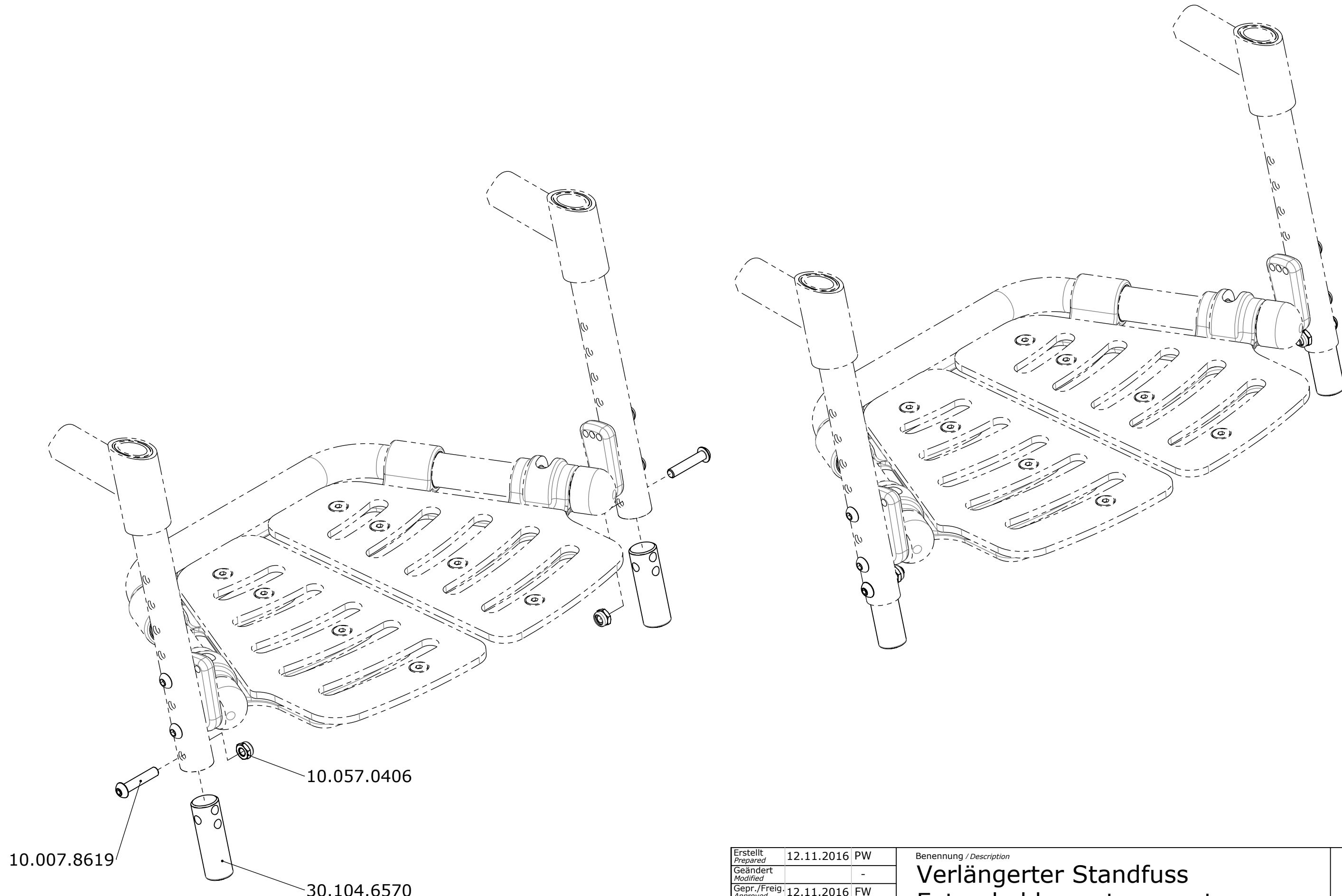

Erstellt Prepared	12.11.2016	PW	Benennung / Description Verlängerter Standfuss Extended legrest support			Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev. -
Geändert Modified		-				
Gepr./Freig. Approved	12.11.2016	FW				
Status freigegeben/approved Status						
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair LCEV	Artikelnummer Art. no. 50.070.6800		

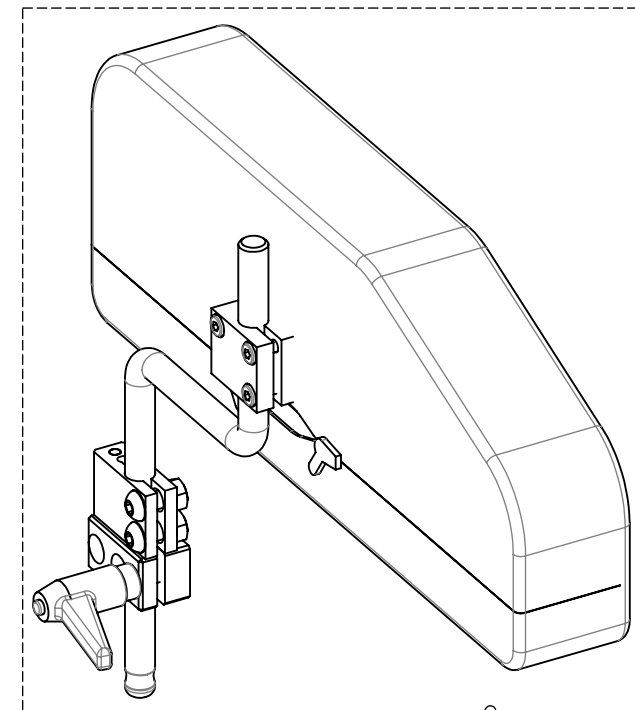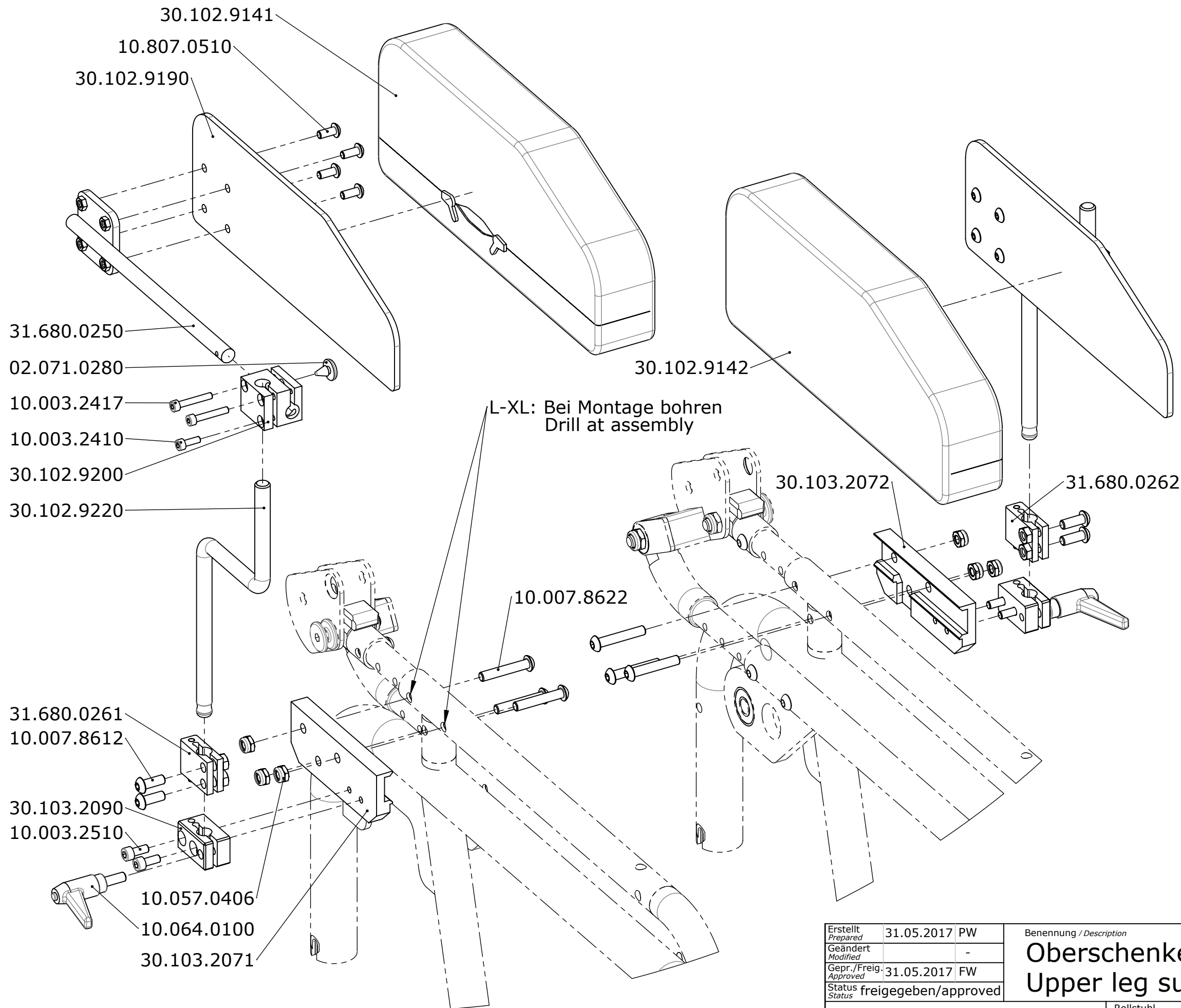

rechts/right:
32.070.0581

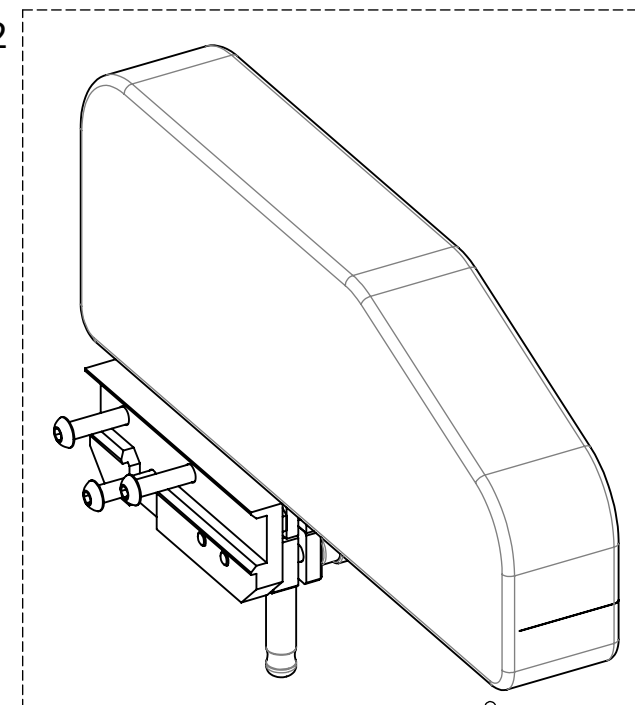

links/left:
32.070.0582

Erstellt Prepared	31.05.2017	PW
Geändert Modified		-
Gepr./Freig. Approved	31.05.2017	FW
Status Status	freigegeben/approved	

Benennung / Description

Oberschenkelsupport
Upper leg support

LEVO 
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO AG
CH-5610 Wohlen
www.levo.ch

Rollstuhl
Wheelchair

LCEV

Artikelnummer
Art. no.

50.070.6900

Blatt / Anz.
Sheet / no. of
1 / 1
Index / Rev.
-