



Bruk av rullestolen

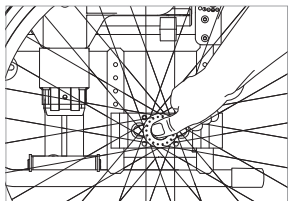

Hurtigkobling drivhjul

Trykk inn knappen i midten av drivhjulet for å ta av eller sette på hjulet.


⚠ Sjekk at hjulet er skikkelig festet ved å påse at knappen spretter ut ca 5 mm når hjulbolten er helt inne i hylsen.

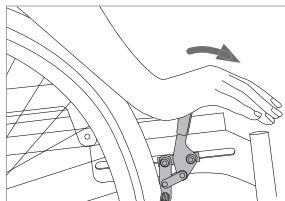

Bremser

Skyv bremsespaken fram og ned når bremsen skal låses.


⚠ Bremsene er kun konstruert for å holde stolen når denne skal stå stille. De må ikke under noen omstendighet brukes som kjørebremser. Til slik bruk anbefaler vi ledsagerbrems (tilbehør).

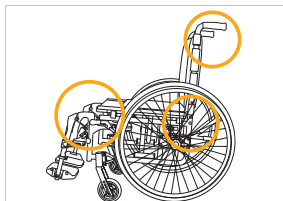

Løftepunkt


Dersom rullestolen skal løftes med bruker sittende i stolen, skal fortrinnsvis anbefalte løftepunkter benyttes.

⚠ Påse at kjørehåndtakene er i lås før du løfter.

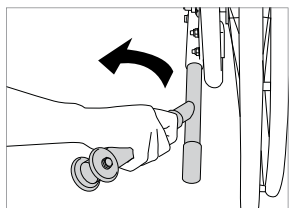


Tippesikring med vippestuss

Tippesikringen felles ned ved å trekke tippesikringen ut samtidig som den vris ned. Tippesikringen er standard justert med en klaring ned til underlaget som gjør det mulig å forserer dørterskler og lignende.

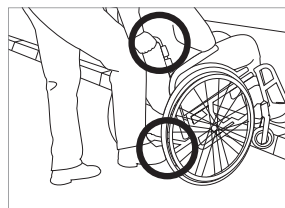


Forsering av hinder

Sving opp tippesikringen når du skal forserer fortauskanter eller lignende. Sett deretter en fot på vippestussen samtidig som du styrer med kjørehåndtakene.

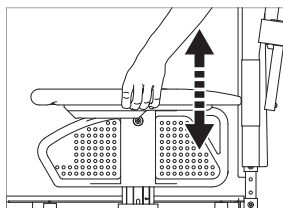

Armlene - av/på


Ved for eksempel sideveis forflytning kan armlenet enkelt fjernes ved å løfte det rett opp. For å sette armlenet på, slipper du det ned i armlensfestet.

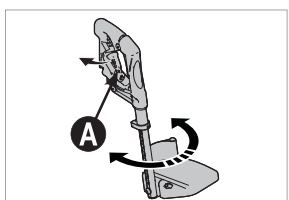

Benstøtter

Benstøttene er ut/innsving- og avtakbare for enklere forflytning til/fra rullestolen. Benstøtten løses ut ved å vri hendelen Ⓐ inn- eller utover.

Benstøtten kan løftes rett opp og tas helt av dersom dette er ønskelig. For å sette den på igjen, gjøres operasjonen i motsatt rekkefølge. Hendelen låser automatisk.

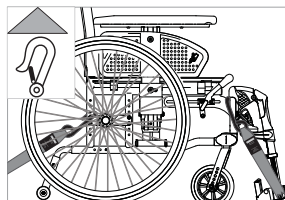

Krasjtestet

Rullestolen kan benyttes som passasjer sete i bil og er godkjent henhold til ISO 7176-19. Rullestolen har avmerket fire festepunkter som må brukes ved fastspenning i motorkjøretøy.


I henhold til NAVs retningslinjer, skal hodestøtte monteres dersom rullestolen skal benyttes som passasjer sete i bil.

📖 Les mer om sikkerhet i bil i rullestolens brukermanual.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no

MANUELL RULLESTOL

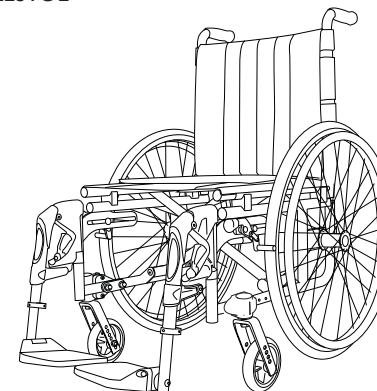


IMPERA


Impera

HURTIGMANUAL

Når du mottar rullestolen

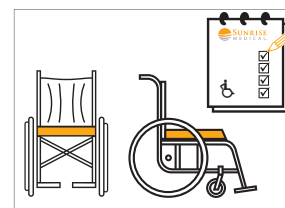


Rullestolen leveres i setebredder i intervallet 33-48 cm og setedybde 33-45 cm. Kontroller at rullestolen du har mottatt har korrekte mål i henhold til din bestilling. Angivelse av rullestolens mål finner du avmerket på krysset, under setet.

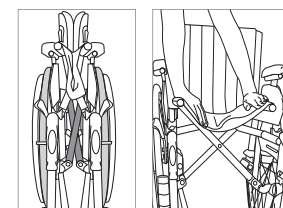


Rullestolen leveres komplett. Det eneste du trenger å gjøre er å folde ut stolen og eventuelt sette på benstøttene. Du folder ut rullestolen ved å trykke ned med flate hender på trekket ved seterørene.

⚠ Ikke ta tak rundt seterørene, fingrene kan komme i klem!

Legg seteputen (tilbehør) på plass, påse at den ligger riktig på seteduken.

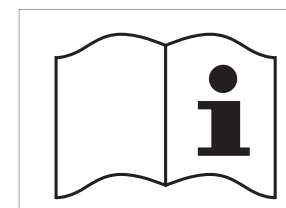


For din egen sikkerhet, og for å få best mulig utbytte av mulighetene i din nye rullestol, anbefaler vi at du leser brukermanualen nøye før du tar i bruk rullestolen.

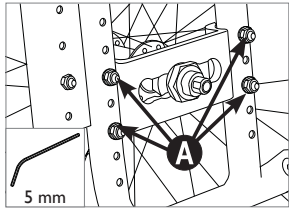

Setehøyde bak

Setehøyden bak kan justeres i intervallet 40-48 cm (36-50 cm med bytte av deler).


- Skru ut skruene **A**
- Flytt hjulblokka opp hvis du skal senke setehøyden
- Flytt hjulblokka ned hvis du skal heve setehøyden
- Sett inn skruene igjen og stram til

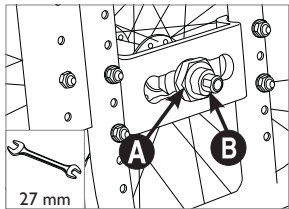

Innstilling av tyngdepunkt

Tyngdepunktet kan justeres i fem ulike posisjoner for å tilpasse kjøreegenskapene til den enkelte.


- Løsne festemutteren **A** på hjulet noen omdreining, vri hylsen **B** 90° og flytt hjulet til ønsket hull.
- Vri hylsen 90° tilbake og trekk festemutteren godt til

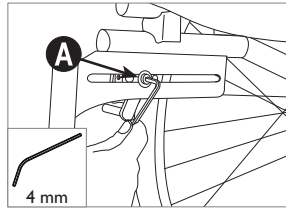

Innstilling av bremsene

Etter justering av setehøyde bak eller tyngdepunkt, er det viktig å kontrollere og/eller etterjustere bremsene.


- Løsne skruen **A**
- Flytt bremsen etter sporet til ønsket posisjon. Riktig avstand mellom bremseklossen og hjulet er ca 2,5 cm når bremsen ikke er aktivert

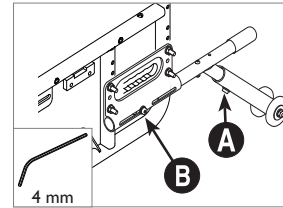

Justering av tippesikring

Juster tippesikringen når du har endret tyngdepunktet på stolen.


- Løsne skruene **A** og **B**
- Dra eller skyv tippesikringen til riktig posisjon
- Det skal maksimalt være 35 mm fra enden på tippesikringen til underlaget
- Skru til skruene igjen

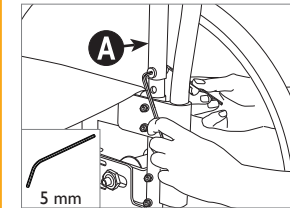

Ryggghøyde

Ryggghøyden er justerbar i intervallet 35-45 cm.

- Høyden justeres ved å skru ut skruen **A** på begge sider
 - Skyv/dra rørene til ønsket høyde
 - Sett inn skruene igjen og stram til
- NB! Ved justering må du påføre skruesikring på alle skrudd forbindelser, for eksempel "Blå Locktite nr 253".

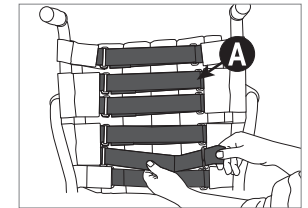


Ryggkurvatur

Et godt polstret ryggtrekk gir god komfort. Seks velcrobånd kan reguleres slik at rullestolryggen former seg for maksimal støtte og komfort. Du kommer til velcrobåndene ved å løsne ryggtrekket på baksiden av ryggen.

Setehøyde foran

Setehøyde foran kan justeres i intervallet 44-48 cm (38-60 cm ved bytte av deler). Setehøyde foran kan endres på ulike måter:


- Flytte svinghjulet opp eller ned i svinghjulsgaffelen (avhengig av størrelse på svinghjul og svinghjulsgaffel)
- Bytte til større eller mindre svinghjul
- Bytte til kortere eller lengre svinghjulsgaffel
- Bytte til teleskopisk lagerhus for trinnløs justering

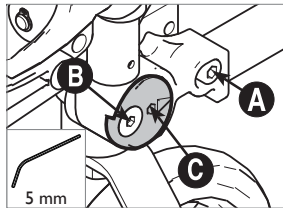

Vinkel på svinghjul



Etter justering av setehøyde foran og/eller setehøyde bak, er det viktig å kontrollere/justere svinghjulsvinkelen til 90° for å oppnå de beste kjøreegenskapene.

- Løsne skruen **A** så vidt. Løsne skruen **B**
- Sett unbrakonøkkel inn i dreieskiven **C** og dreii til ønsket vinkel. Benytt en vinkel mot underlaget som rettesnor
- Trekk til skruen **B** skruesikring, for eksempel Blå Locktite, nr 243, kan benyttes, skru deretter til skruen **A**

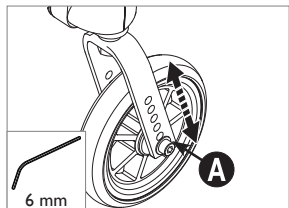

Flytte til en annen posisjon i svinghjulsgaffelen


- Skru ut skruen **A** i navet på svinghjulsgaffelen
- Flytt hjulet opp- eller ned
- Skru til skruen igjen

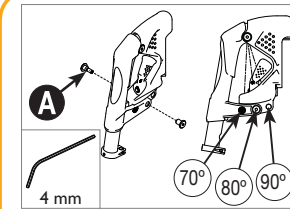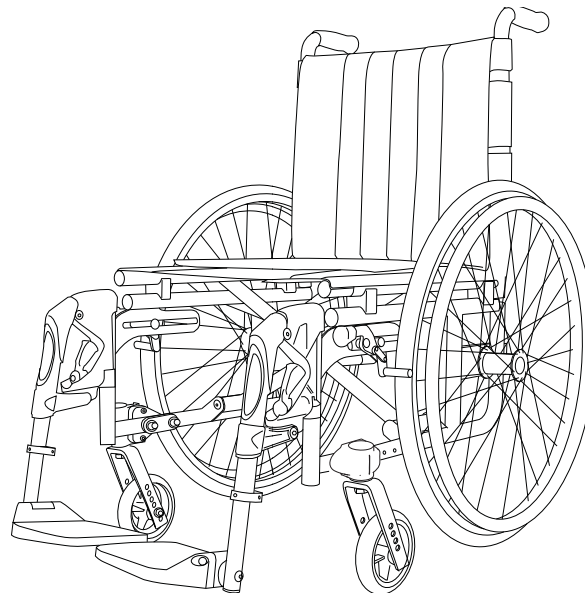

Benstøttevinkel

For å sikre optimal sittestilling kan benstøttene stilles til 70°, 80° eller 90°.


- Skru ut skruen **A**
- Trekk ut- eller skyv benstøtten til ønsket vinkel
- Sett skruen i riktig hull og skru til

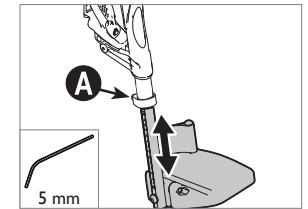

Benstøttelengde

Lengden ned til fotplaten kan justeres trinnløst.

- Løsne festeskruen **A** ca 5 mm. Juster benstøtten til ønsket lengde og skru til skruen igjen
- Benytt måleskalaen som veiledning

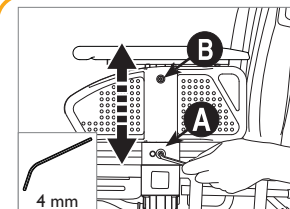

Armlene- og klesbeskytterhøyde

Armlenene er trinnløst justerbare i høyde, for optimal støtte av armene.

- Løsne skruen **A**
- Hev eller senk armlenet til ønsket posisjon
- Skru til skruen igjen
- Benytt måleskalaen som veiledning

Når armlenet er justert til ønsket posisjon kan du flytte klesbeskytteren for å unngå åpninger mot hjulet.

- Løsne skruen **B** og skyv klesbeskytteren opp eller ned.
- Skru til skruen igjen.