

REKONDITIONERINGSANVISNING

GEMINO ROLLATORER

Rekonditionering, tvätt och rengöringsanvisning

Rollatorn och dess tillbehör kan rengöras och torkas i de diskabinett som används på hjälpmedelscentraler.

Vid rengöring och tork i diskabinett skall rollatorn vara utfälld och placerad ståendes på sina 4 hjul.

Inga delar eller tillbehör behöver demonteras vid rekonditionering. Eventuella demonterade delar kan liksom rollatorn torkas i torkskåp eller lufttorkas. Korgen kan tas av och tvättas separat, maskintvätt 60°, handtvätt 40° eller desinfektion.

Desinfektion

Rollatorn kan desinficeras med desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Använd inte desinfektionsmedel som innehåller klor eller fenol.

Även korgen kan desinficeras med ett godkänt desinfektionsmedel. Använd då inte värmedesinfektion.

Checklista

Rollatorn kan återanvändas till en ny brukare. Kontrollera då följande:

- Kontrollera att bromsarna fungerar korrekt
- Efterjustera bromsarna vid behov
- Kontrollera att handbromsarna står i korrekt position
- Rengör bromsklossarna
- Rengör bromsfjädrarna
- Kontrollera att hjulen är hela och inte är skadade
- Byt ut skadade eller utslitna hjul
- Kontrollera att alla rörliga delar fungerar
- Kontrollera alla skruvar och skruva åt vid behov
- Kontrollera hjulupphängning och byt om nödvändigt
- Se till att rollatorn är hygieniskt ren