

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

INKL. TVÄTT- OCH RENGÖRINGSANVISNING

GEMINO ROLLATORER

Tvätta rollatorramen

Ramen bör tvättas regelbundet med mild tvål/vatten. Om ramen är mycket smutsig kan avfettningsmedel användas. Ramen kan eventuellt också spolas med högtryckstvätt. Undvik i så fall att spola direkt mot kullagren. Torka av rollatorn efter varje tvätt och när den körs i regnväder. Om avfettningsmedel använts bör de rörliga delarna smörjas.

Rengöring av bromsarna

Rengör bromsklossarna och bromsfjädern regelbundet.

Rengöring av korgen

Korgen kan tas av och tvättas separat, maskintvätt 60°, handtvätt 40° eller desinfektion. För desinfektion: använd ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel. Använd inte värmedesinfektion.

Låsmekanism

Om låsmekanismen för ihop/utfällning går tungt efter en tid rekommenderar vi att kontaktytorna smörjs med Vaseline eller liknande.

Underhåll

- Kontrollera att bromsarna fungerar som de ska. Efterjustera vid behov.
- Kontrollera att hjulen är hela och utan skador.
- Håll rollatorn ren och se till att alla rörliga delar fungerar.
- Kontrollera alla skruvar och skruva åt dem vid behov.