

Festeplater til Kinetic Balance vester og belter



Beskrivelse

Art. nr.

Øvre feste til Kinetic Balance vest, inkl. skruer. Justerbart.	☐	5005247
Festeplate til Kinetic Balance hoftebelte og vest, inkl. skruer. Armleneplassert.	☐	5005246
Festeplate til Kinetic Balance lårbelte og hoftebelte, inkl. skruer. Setebase plassert.	☐	5005245

MONTERING AV KINETIC BALANCE VEST



3 mm
4 mm
5 mm




10 mm



1x
art.nr 5005247



2x
art.nr 5005246

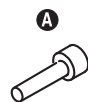

4 x M6x20
art.nr 97166





2 x M5x10
art.nr 97227




2 x M6x16
art.nr CA340007



2 x M6
art.nr A200006

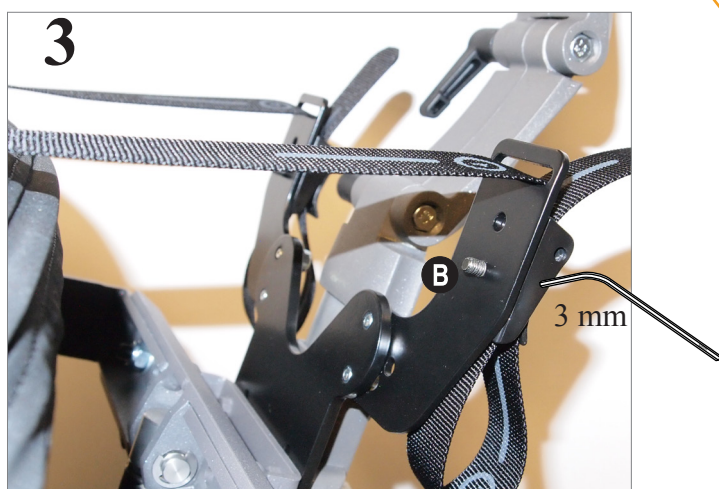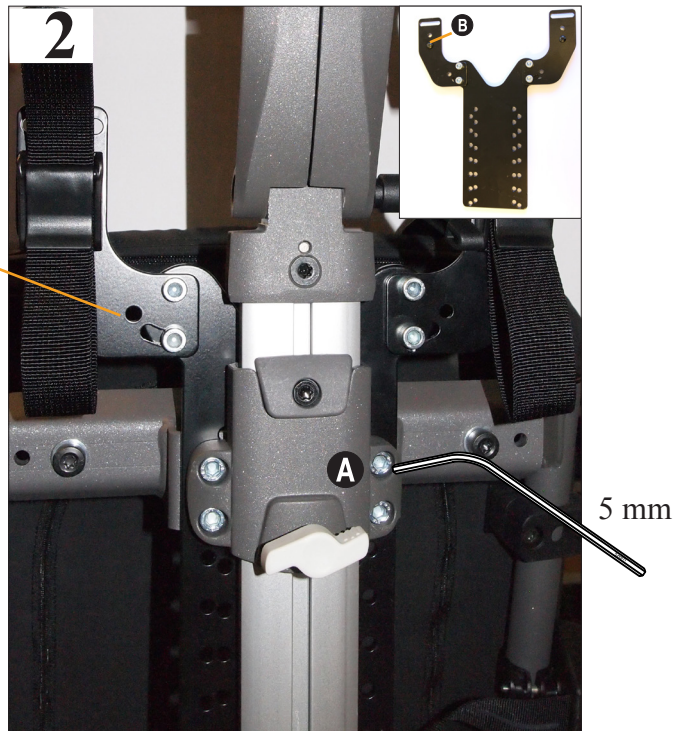


Løsne skruer B fra toppfestet. Bruk samme hull til å skru fast beltet med skruer B.

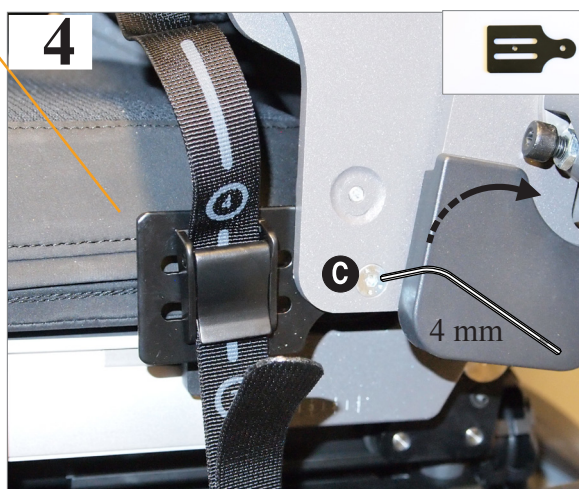


MERK! Tilt rygg bakover for å få tilgang til skruer C. Bruk fastnøkkel til å stramme mutter bak.

MONTERING AV KINETIC BALANCE 2-PUNKTS LÅRBELTE

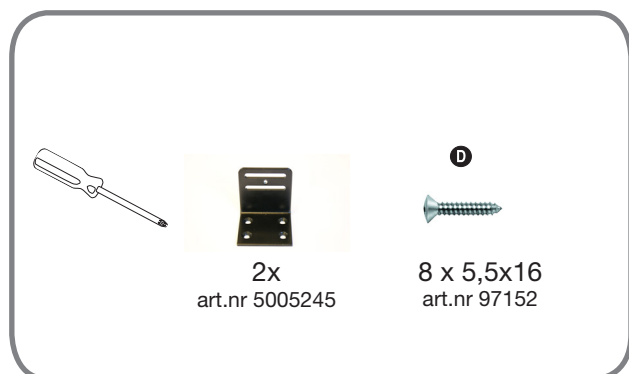

Ved 2-punkt lårbelte benyttes festeplate art.nr. 5005245 inkl. festemateriell.


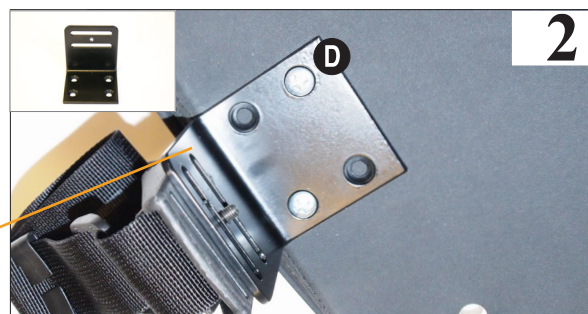


Festet monteres på seteplaten.



Vinkelen for festet monteres oppover/nedover. Festet kan kappes ved behov, men vær obs på eventuelle skarpe kanter.

MONTERING AV KINETIC BALANCE 2-PUNKTS HOFTEBELTE

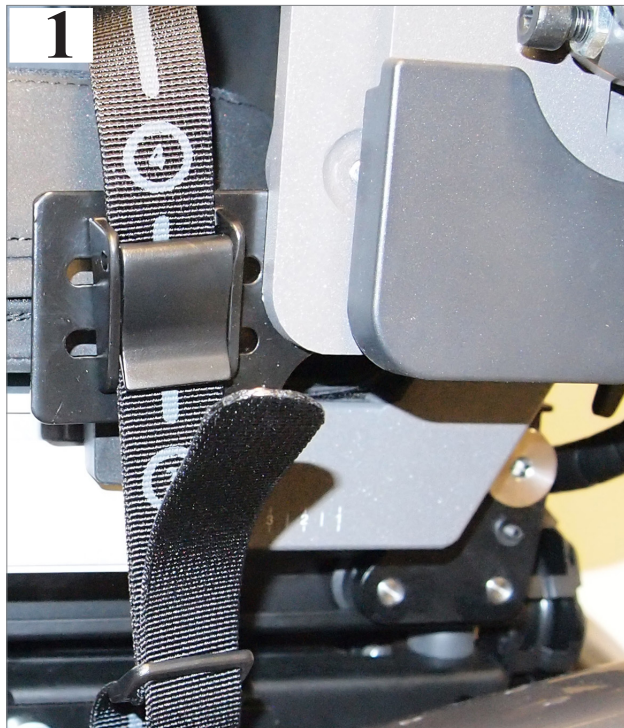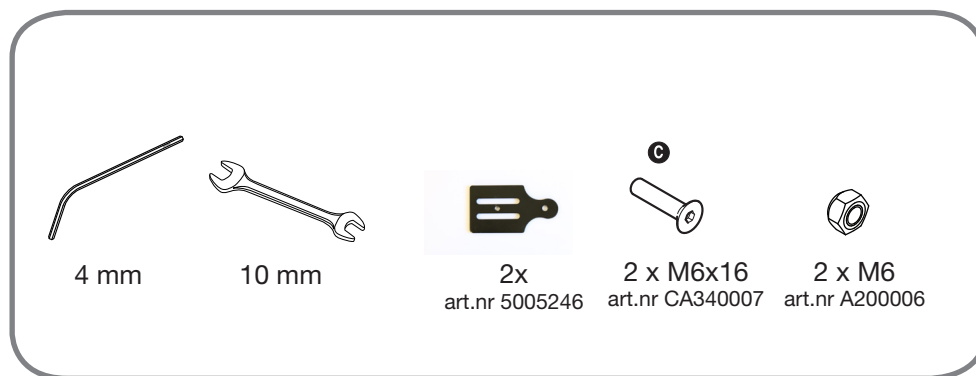

Ved 2-punkts hoftebelte benyttes festeplate art.nr 5005246 inkl. festemateriell.



MERK! Tilt rygg bakover for å få tilgang til skrue C. Bruk fastnøkkel til å stramme mutter bak.


MONTERING AV KINETIC BALANCE 4-PUNKTS HOFTEBELTE



4 mm




10 mm

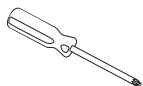

2x
art.nr 5005245



2x
art.nr 5005246

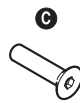

2 x M6x16
art.nr CA340007




2 x M6
art.nr A200006



8 x 5,5x16
art.nr 97152




Ved 4-punkts hoftebelte benyttes både festeplate art.nr 5005245 og festeplate art.nr 5005246, inkl. festematerieller.

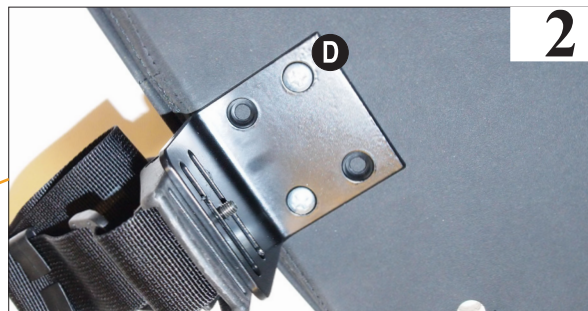

Festeplaten art.nr. 5005245 monteres på seteplaten.




Vinkelen for festeplaten monteres oppover/nedover. Festet kan kappes ved behov, men vær obs på eventuelle skarpe kanter.

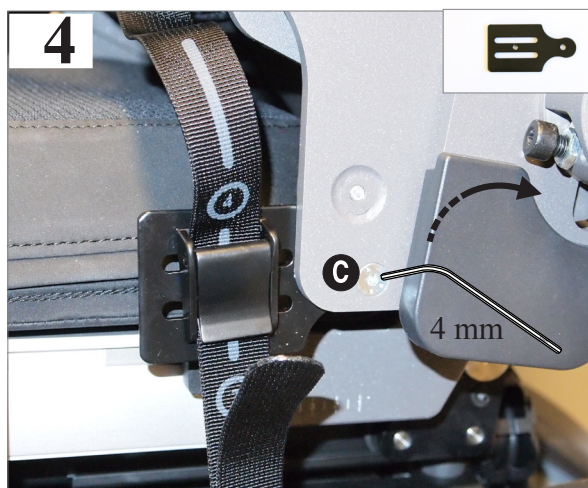

MERK! Tilt rygg bakover for å få tilgang til skrue C. Bruk fastnøkkel til å stramme mutter bak.

MONTERING AV KINETIC BALANCE BRYSTBELTE

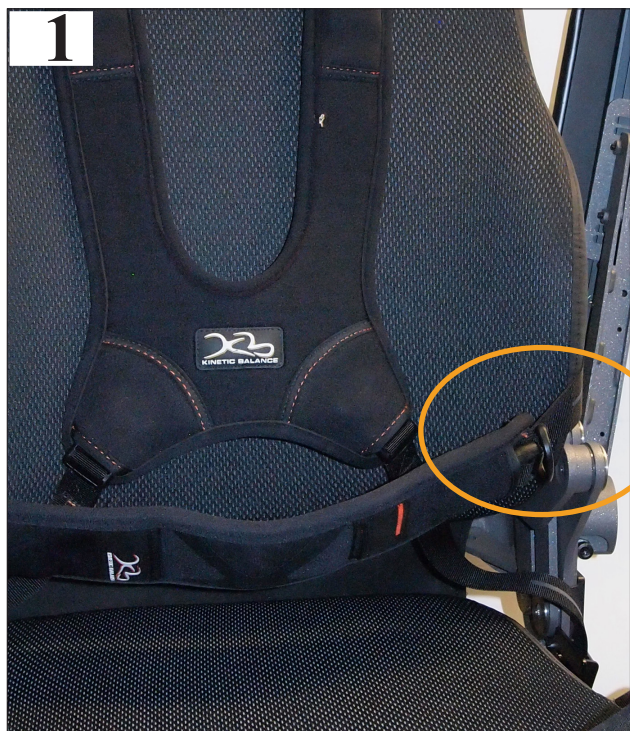

Brystbeltet leveres inklusive fester og skruer.
NB! Ryggputen må løsnes fra røret, før festet monteres i ryggørret, tilpasset bruker.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no