

LIFE SERIEN

FIND DEN, DER PASSER TIL DIN LIVSSTIL



LIFE SERIEN

LEV LIVET FULDT UD!
QUICKIE LIFE SERIEN GIVER DIG MERE
FRIHED END NOGENSINDE FØR.

LIFE Serien imponerer med sine lette, robuste, stilfulde og meget justerbare kørestole.

Med mulighed for at vælge mellem fast ramme for bedre køreegenskaber eller en foldbar ramme for lettere transport og håndtering, er det let at finde en LIFE kørestol, som passer til dig.



LIFE ALLROUNDEREN

Krydsramme,
fast forramme



LIFE SA
Krydsramme,
swing-away benstøtter



LIFE R

DEN SPORTY

Fastramme,
fast forramme



LIFE R SA
Fastramme,
swing-away benstøtter

LIFE i

DEN JUSTERBARE

Krydsramme,
swing-away benstøtter



LIFE

MODERNE LIVSTIL



NEMMERE HVERDAG

Til forretningsmøde her til morgen? Planlægger du en udflugt i eftermiddag? Uanset hvilke planer du har, er din QUICKIE LIFE klar.

Men hvorfor stoppe her? Tilpas din LIFE med et valg fra en bred vifte af sidestykker, armlæn, benstøtter, fodstøtter, hjul og drivringe. Eller vis din personlige stil igennem et valg af mellem 30 rammefarver og anodiserede dele.



LIFE

ALLROUNDEREN



LIFE SA

Krydsramme,
swing-away benstøtter

Valgmuligheder og funktioner

Konfigurer din LIFE kørestol, så den passer til dine individuelle behov.



// SÆDEHØJDE JUSTERBAR I 7 POSITIONER

For at opnå den perfekte siddestilling har det lodrette drivhjulsophæng 7 forskellige indstillingsmuligheder. Derudover kan cambringen justeres fra 1 til 4 grader.



// MODERNE DESK-ARMLÆN

Forbedret stabilitet i stilfuldt design.



// VINKELINDSTILLELIG RYG

Lav vægt og nem at justere. 20 graders justeringsmulighed fra -12° til $+12^\circ$ i trin af 4° .



// HØJDEJUSTERBART ARMLÆN

Sikrer nem forflytning og god armstøtte samt lav transportvægt.



// AKTIV RAMME

Kompakt ramme (85°) til mere aktive brugere. Fås med eller uden 2 cm indsnævring.



// FIKSERING AF KRYDSRAMMEN

Enhåndsbetjent funktion fastholder stolen i sammenfoldet tilstand.



// SVINGBAR PLATFORMFODSTØTTE

Lav vægt, vinkel- og dybdejusterbar.



// LETVÆGTS ANTI-TIP

Forbedret stabilitet uden at tilføje megen vægt.

LIFE R

PRÆSTATION I HØJ KLASSE



DEN AKTIVE LIFE R

Fast, holdbar og robust. LIFE R er designet til at forbedre dit liv i dag og langt ud i fremtiden. Uanset hvad dagen bringer, giver det energi-effektive design på LIFE R dig mulighed for at fokusere på det vigtige.

LIFE R fastrammekørestolen fås med fast forramme eller svingbare fodstøtter. LIFE R har et modulopbygget design, som betyder at forrammen kan udskiftes for at ændre sædedybden eller rammetypen. Den faste forramme fås i 3 varianter (75°, 85° og 85° med 2 cm indsnævring) og fire rammelængder. Swing-away rammen fås i to varianter (70° og 80°), med forskellige fodstøtter og tre rammelængder.



LIFE R

DEN SPORTY



LIFE R SA

Fastramme,
swing-away benstøtter

Valgmuligheder og funktioner
Konfigurer din LIFE R kørestol, så den passer til dine individuelle behov.



// SÆDEHØJDE JUSTERBAR I 7 POSITIONER

For at opnå den perfekte siddestilling har det lodrette drivhjulsophæng 7 forskellige indstillingsmuligheder. Derudover kan cambringen justeres fra 1 til 4 grader.



// SIMPEL OG HURTIG JUSTERING AF VINKEL PÅ FORGAFFEL

Flere justeringsmuligheder sikrer optimale køreegenskaber.



// VINKELINDSTILLELIG RYG (TILKØB)

Lav vægt og nem at justere. 20 graders justeringsmulighed fra -12° til +12° i trin af 4°.



// HØJDEJUSTERBART ARMLÆN (TILKØB)

Sikrer nem forflytning og god armstøtte samt lav transportvægt.



// AKTIV RAMME

Kompakt ramme (85°) til mere aktive brugere. Fås med eller uden 2 cm indsnævring.



// AKSEL TIL HÅNDCYKEL (TILKØB)

Forbedret stabilitet ved brug af stolen sammen med en håndcykel.



// LETVÆGTS PLATFORMSFODSTØTTE

Justerbar i vinkel og dybde. Fås i kompositmateriale og aluminium.



// AKTIVE SVINGBARE BENSTØTTER

Giver et moderne og aktivt look. Fås i vinkler på 70° og 80°.



LIFE i

DE RIGTIGE JUSTERINGSMULIGHEDER
TIL INDIVIDUELLE BEHOV

DEN JUSTERBARE LIFE i

Omfattende justeringsmuligheder gør LIFE i det perfekte valg for brugere med progressive neurologiske lidelser som eksempelvis hjerneblødning, ALS eller DS. Den store fleksibilitet sikrer, at køreegenskaberne for en LIFE i altid passer til de skiftende behov for brugeren.

Patienter, der har haft en hjerneblødning, er ofte ramt af halvsidig lammelse. Enhåndsbetjente drivringe og bremser, halvt bakke-bord og hemi-armlæn er støttende funktioner i denne situation. Endvidere er den lave sædehøjde beregnet til brugere, der "går" stolen frem.

For patienter med DS (Dissemineret Sklerose) og ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) vil vores vinkeljusterbare og tilbagelænedede ryglæn - kombineret med mulighederne fra sortimentet af JAY rygge - give optimal positionering af kroppen. Sædehøjden for og bag kan justeres med helt ned til 1 cm ad gangen, så sædevinklen kan løbende tilpasses efter skiftende behov.



LIFE i

DEN JUSTERBARE



Valgmuligheder og funktioner

Konfigurer din LIFE i kørestol, så den passer til dine individuelle behov.



// NEM JUSTERING AF SÆDEHØJDE FORAN

Muligheden for justering af sædehøjden foran fra 38 til 54 cm er designet til neurologiske patienter samt brugere, der "går" stolen frem.



// MULTIJUSTERBAR ENHED TIL SÆDEHØJDE BAGTIL

Med en enkelt enhed kan bagerste sædehøjde, tyngdepunkt og cambring nemt justeres.



// MULIGHED FOR TILPASNING AF SÆDEDYBDEN

Sædedybden kan tilpasses ved at flytte rygrørerne, og sædepolsteret kan forlænges eller forkortes med op til 4 cm.



// VINKELINDSTILLELIG RYG

Ryggen er nemt at justere og giver 30 graders justeringsmulighed fra -5° til +25°. Ryglænet fås også i fast eller med velcro-indstillelig stroppryg version.



// HALVT BAKKEBORD

Halvt bakkebord, fx til brugere, der har haft en hjerneblødning. Passer både til højre og venstre side.



// HEMI-ARMLÆN

Dette armlæn giver god positionering for armen, især hos brugere med halvsidig lammelse.



// KROPSSTØTTER

Større stabilitet for kroppen. Disse kropstøtter kan justeres i højde, vinkel og dybde.



// JAY RYGGE OG PUDER

LIFE i kan udstyres med JAY produkter for avanceret positionering.

TEKNISKE DATA

	LIFE	LIFE SA	LIFE R	LIFE R SA	LIFE i
Maks. brugervægt:	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	140 kg
Sædebredde:	36 – 50 cm	36 – 50 cm	34 – 48 cm	34 – 48 cm	34 – 50 cm
Sædedybde:	36 – 50 cm	36 – 50 cm	36 – 50 cm	36 – 50 cm	36 – 50 cm
Sædehøjde (foran):	40 – 54 cm	40 – 54 cm	39 – 50 cm	39 – 50 cm	38 – 54 cm
Sædehøjde (bagtil):	40 – 50 cm	40 – 50 cm	36 – 45 cm	36 – 45 cm	37 – 51 cm
Ryghøjde:	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm	25 – 45 cm	25 – 45 cm	36 – 50 cm
Rygvinkel:	-12° – +12°	-12° – +12°	-12° – +8°	-12° – +8°	-5° – 25°
Tyngdepunkt (COG):	2,2 – 8,2 cm	2,2 – 8,2 cm	2,2 – 8,2 cm	2,2 – 8,2 cm	1 – 5 cm
Cambring:	0° – 4°	0° – 4°	0° – 4°	0° – 4°	0° og 3°
Vinkel på forramme:	75°; 85°; 85° med 2 cm indsnævring	80° og 70°	75°; 85°; 85° med 2 cm indsnævring	80° og 70°	80° og 70°
Totalvægt:	fra 11 kg	fra 11 kg	fra 11 kg	fra 11 kg	fra 15 kg
Farver:	30	30	30	30	30
Crashtestet:	ja	ja	ja	ja	ja

For yderligere information om specifikationer, valgmuligheder og tilbehør, kontakt venligst Sunrise Medical.

Alle informationer kan ændres uden forudgående varsel.

Hvis du er synshandicappet kan du se dette dokument som PDF på www.SunriseMedical.dk eller alternativt på anmodning i stort tekstformat



Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
2605 Brøndby

T: +45 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

