


MONTERINGSANVISNING

Cirrus G5

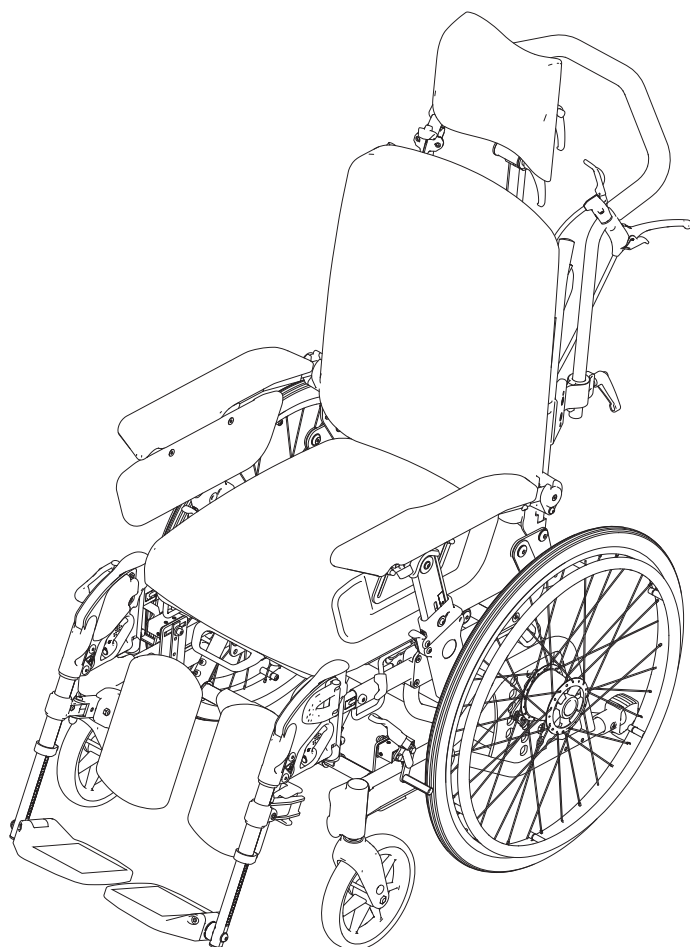

Beskrivelse	Artikkelnummer
Cirrus G5 SB 39	☐ 3500039-2NO
Cirrus G5 SB 42	☐ 3500042-2NO
Cirrus G5 SB 45	☐ 3500045-2NO
Cirrus G5 SB 48	☐ 3500048-2NO
Cirrus G5 SB 51	☐ 3500051-2NO
Cirrus G5 SB 54	☐ 3500054-2NO



Rullestolen leveres komplett. Det eneste du behøver å gjøre er å:

1. Rygg og vaiere

- Folde opp ryggen
- Sett inn bolten **A**.
- Påse at alle wirer ligger som vist i illustrasjonen
- Samler alle wirer med velcrostropp **B**

2. Ryggpute

- Tre ryggputen på skrått inn ovenfra mot de to ryggørerne **C**. Når den er i riktig posisjon, helt nede på rørene, presses den inn mot selve ryggen slik at den fester i velcroen på ryggørerne. Videre legges den sorte kappen inn i en slak bue over på seteplaten.
- Til slutt festes bakre del av trekket til velcroen i «lommen» som kommer ned på baksiden av ryggen. Trykk deretter trekket inn mot ryggen for å feste det. Breezy logoen skal være synlig nede til venstre, sett bakfra.

3. Setepute

- Legg på plass seteputen.

NB! For at seteputen skal gi riktig komfort og avlastning for brukeren, er det veldig viktig at denne legges riktig i stolen.
Svart stoff skal ned mot seteplaten. Glidelås (og vaskelapp på innsiden) skal peke inn i stolen, mot ryggen).

4. Kjørebøyle

- Skru inn kjørebøylens låsehendler **D**.

5. Hodestøtte

- Monter hodestøtte

6. Armlener

- Montere armlener




7. Benstøtter






- Montere benstøtter

Før du tar i bruk rullestolen:

📖 Monter eventuelt tilbehør i henhold til monteringsanvisningen som følger tilbehøret.

📖 Les brukermanualen.

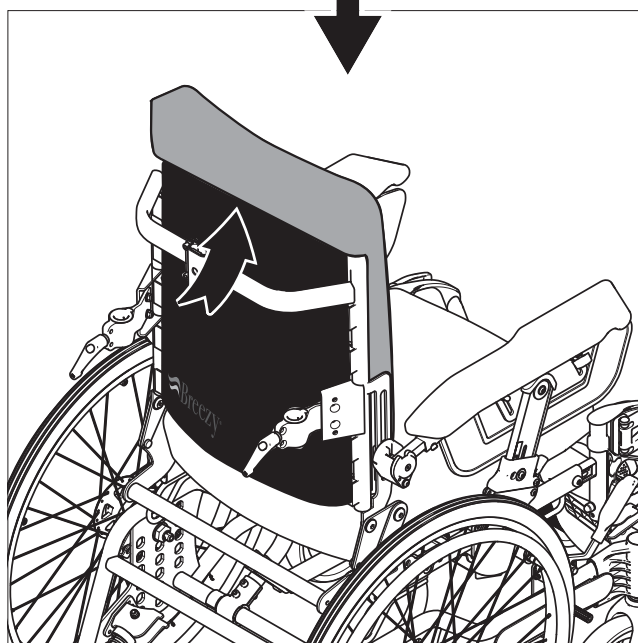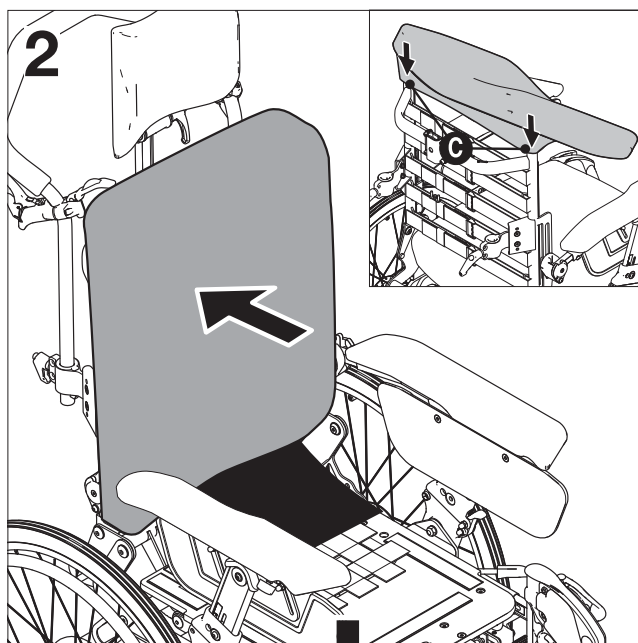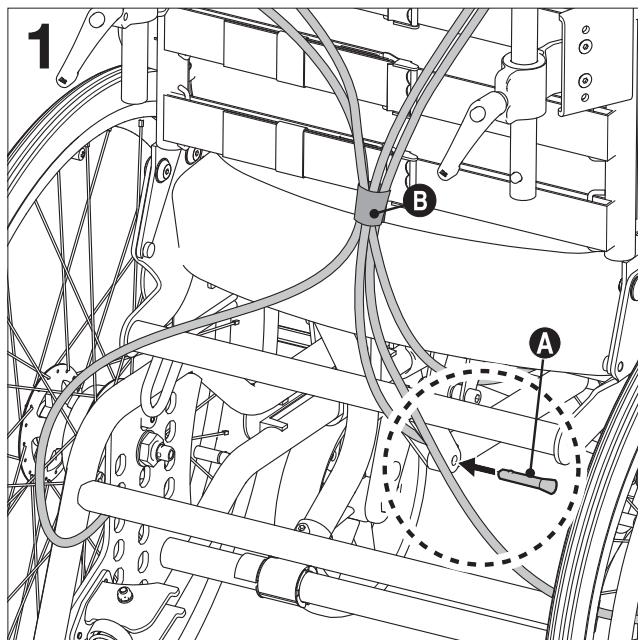

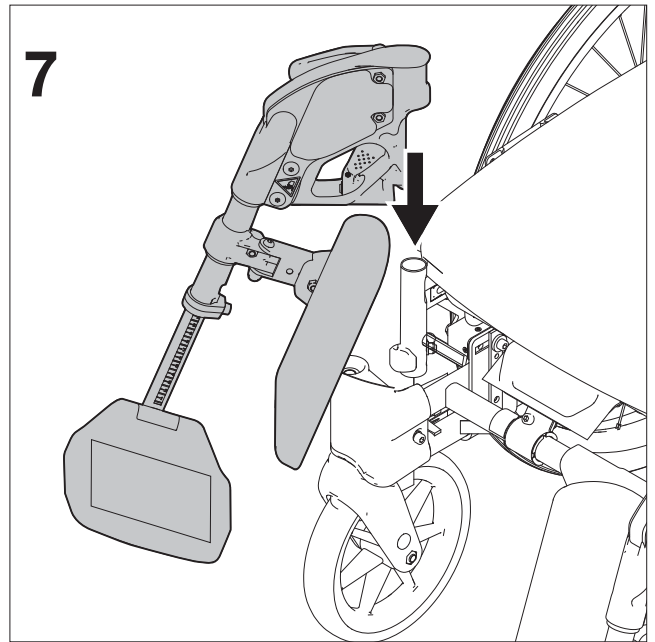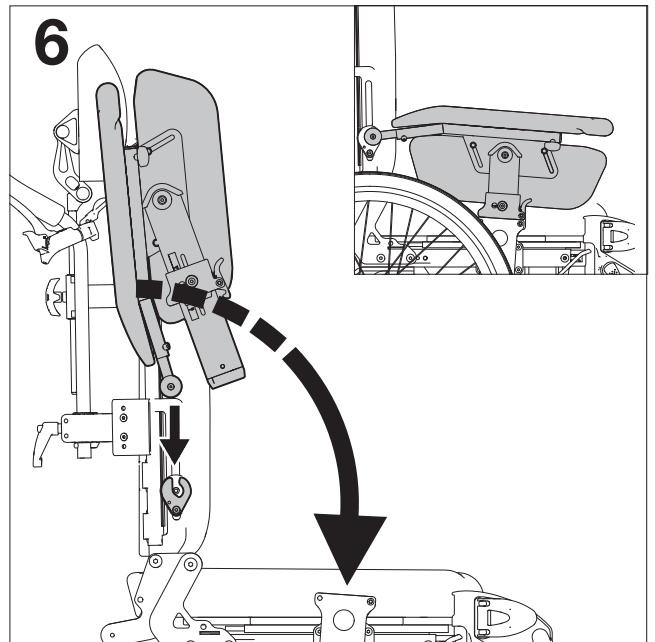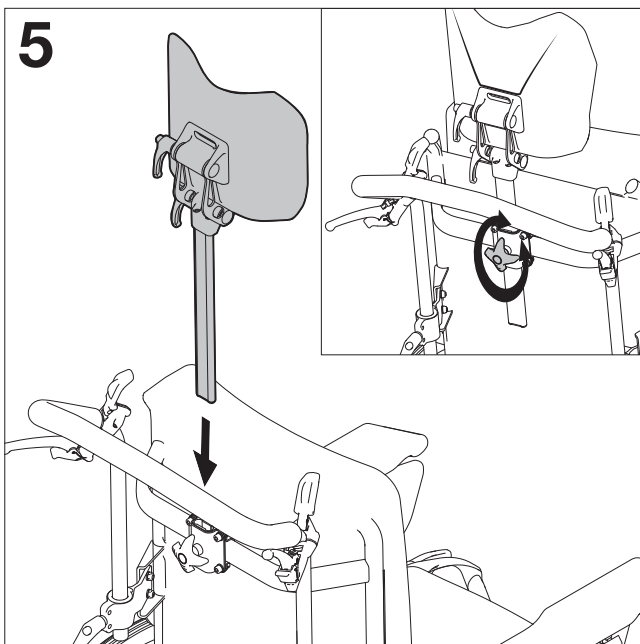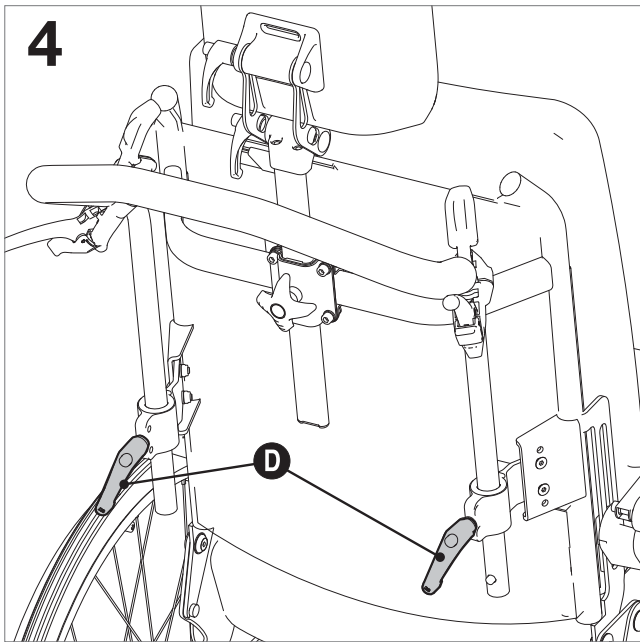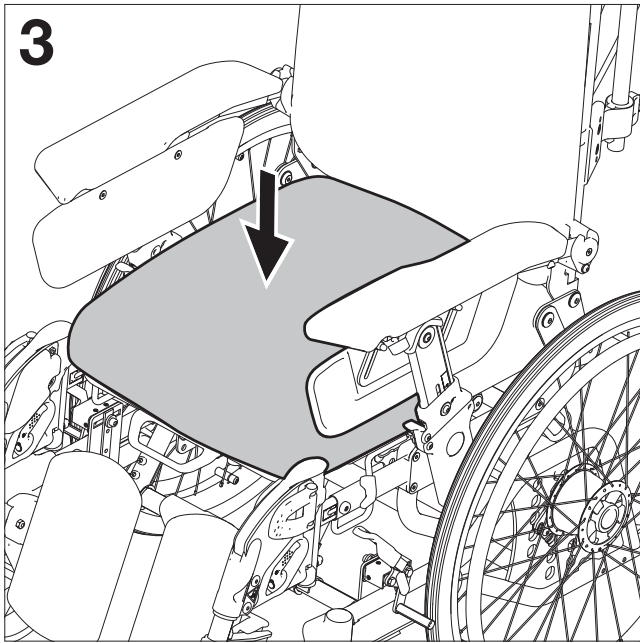



Sunrise Medical AS
Smestadveien 29
2619 Lillehammer
Norway
T: +47 61222520
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no