

MONTERINGSANVISNING

Enhåndsbrems



Beskrivelse


Enhåndsbrems høyre/venstre

Art. nr



9012149

GEMINO

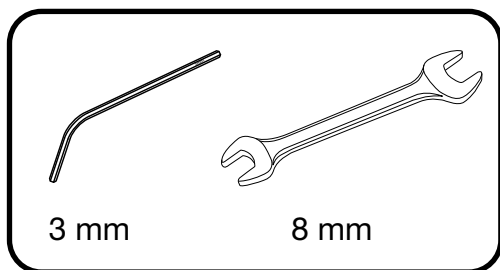



“Slakk” wirene på bremsene på begge sider.



Fjern de to skruene på håndtaket.



Skrue fast braketten med skruene som følger med.

4




Fest wirene inn i plast hjulet.

5



Sett pinnebolten inn i bremsehåndtaket.

6

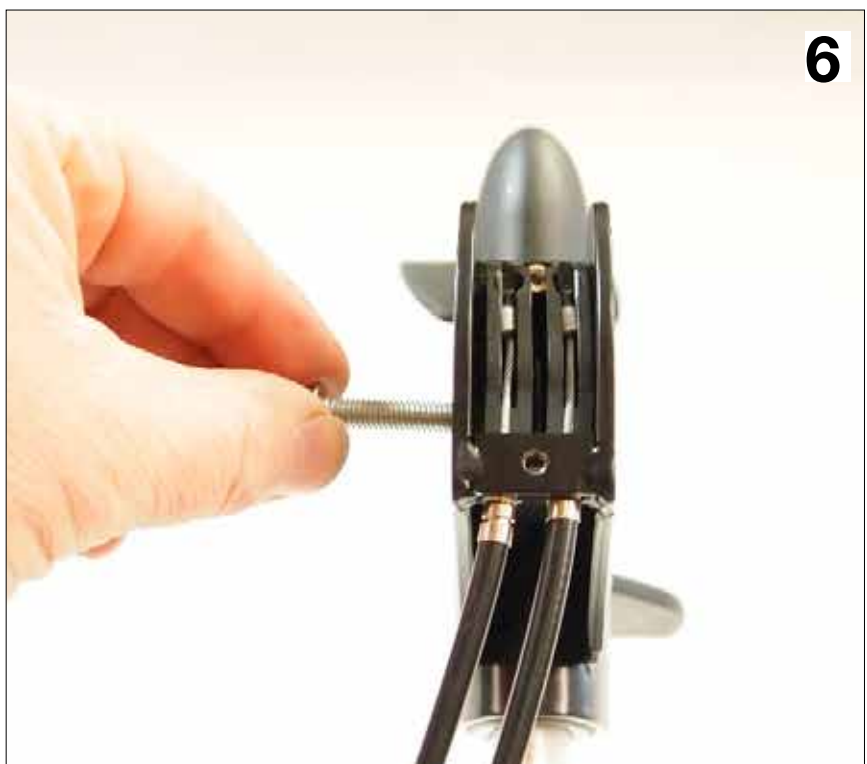

Sett plasthjulet i braketten med skruen og trekk inntil med låsemutter.



8

Skru mutteren på pinne bolten
NB! festes med Loctite.



7

Se til at alt sitter på plass
og går lett.



Stram wirene på begge sider.



Sett på lokket.
Se til at begge bremsene tar likt og at
parkeringsbremsen fungerer.



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 593 888
customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu