


MANUELL RULLSTOL

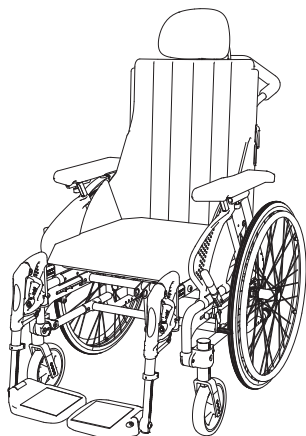

EMINEO


Emineo

QUICK GUIDE

När du mottager rullstolen




Rullstolen levereras i sittbredder i intervallet 39-51 cm och sittdjup 36-50 cm. Se till att rullstolen du har fått har rätt mått enligt din beställning. Uppgifter om rullstolens dimensioner är markerade på rullstolens ram, under sätet.

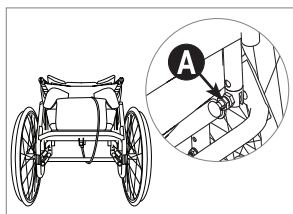


Rullstolen levereras komplett. Det enda du behöver göra är att fälla upp ryggen och sätta på armstöden och fotstöden.

- Se till att bulten **A** låser ryggrören på båda sidor när du fäller upp ryggen. Vrid bulten 90° om bulten är i öppet läge.
- Montera armstöden och fotstöden
- Placera sittdynan (tillbehör), se till att den sitter rätt på sittplattan

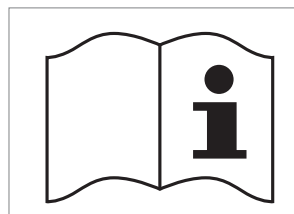


För din egen säkerhet och för att få ut det mesta av funktionerna i din nya rullstol, rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen innan du börjar använda rullstolen.

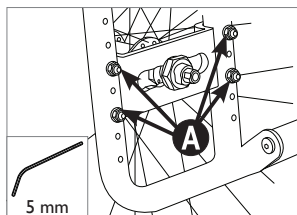

Bakre sitthöjd

Bakre sitthöjden kan justeras i intervallet 40-48 cm (36-50 cm med byte av delar).


- Ta bort skruvarna **A**
- Flytta drivhjulblocket uppåt om du önskar lägre sitthöjd
- Flytta hjulblocket nedåt om du ska höja sitthöjden
- Sätt dit skruvarna och dra åt

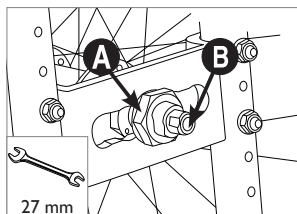

Ställa in tyngdpunkten (balanspunkt)

Balanspunkten kan justeras i fem olika positioner för att anpassa köregenskaperna till brukaren.

- Lossa muttern **A** på hjulblocket några varv, vrid hylsan **B** 90 ° och flytta till det önskade hålet.
- Vrid 90 ° tillbaka och dra åt fästmuttern

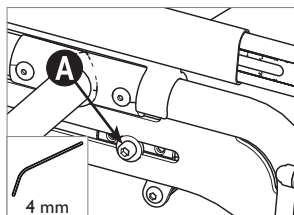

Justering av bromsarna



Efter justering av sitthöjden bak eller balanspunkten, är det viktigt att kontrollera och/eller justera bromsarna.

- Lossa skruven **A**
- Flytta bromsen längs spåret till den önskade positionen. Rätt avstånd mellan broms och hjulet är ca 5 mm, när bromsen är deaktiverad.

Främre sitthöjden

Främre sitthöjd är justerbar i intervallet 40-45 cm (36-50 cm vid byte av delar). Främre sitthöjden kan ändras på olika sätt:

- Byt till ett större eller mindre länkhjul
- Byt till kortare eller längre länkhjulsgaffel
- Flytta länkhjulet uppåt eller nedåt i länkhjulsgaffeln (beroende av storleken på länkhjulet och länkhjulsgaffel)

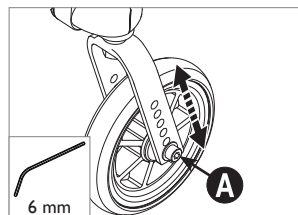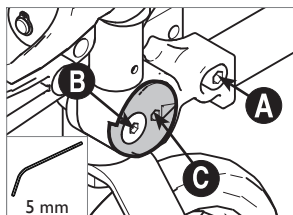


Flytta till en annan position i länkhjulsgaffeln


- Ta bort skruven **A** i navet på länkhjulsgaffeln
- Flytta hjulet uppåt eller nedåt
- Sätt dit skruven igen.

Vinkel på länkhjulet

Efter justering av sitthöjden, är det viktigt att kontrollera/justera att länkhjulsvinkeln är 90 °, för att erhålla bästa körbarhet.

- Lossa skruven **A** något. Lossa skruven **B**
- Placera insexnyckeln i kopplingsringen **C** och vrid till önskad vinkel, se skalan
- Dra åt skruven **B** Skrutvtätning, såsom Loctite Blue nr 243, kan används, sedan dra åt skruven **A**

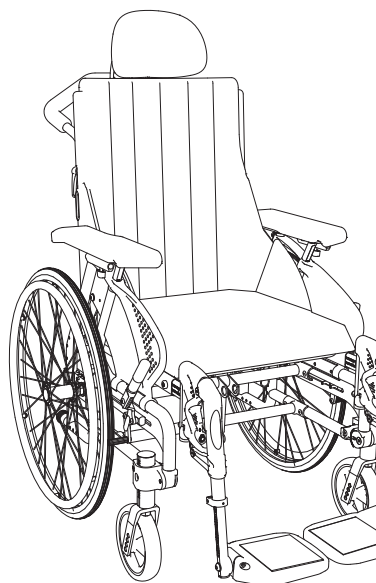


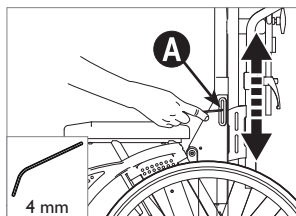

Rygghöjd

Rygghöjden är steglöst inställbar i intervallet 50-60 cm.


- Lossa ryggsätets överdrag
- Lossa skruvarna **A** på båda sidor av rygg
- Justera till önskad rygghöjd
- Dra åt skruvarna
- Se till att skruven sitter upptill eller längst ned i spåret innan du skruvar åt skruven och sätter på ryggsättsklädseln
- En måtskala på ryggröret hjälper dig i förhållande till höjden av ryggen.

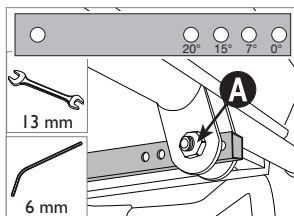

Ryggvinkel


Ryggvinkeln är justerbar i intervallet 0 ° till 20 °. Som standard är ryggvinkeln 7 °. Ryggvinkeljusteringen ligger under sätet, vid den bakre delen av rullstolen.

- Ta bort skruven **A**
- Genom att flytta skruven till bakersta hålet får du ryggvinkel 0 °, därefter 7 °, 15 ° och framre hålet kommer att ge 20 °
- Dra åt skruven

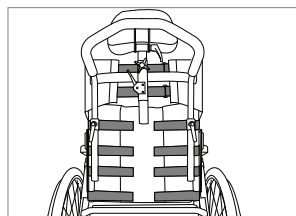

Ryggkurvatur


En väl stoppad klädsel ger god komfort. Kardborreband i ryggen kan regleras så rullstolens rygg formar sig för maximalt stöd och komfort. Du kommer åt remmarna genom att lossa rygglädseln på baksidan av ryggen.

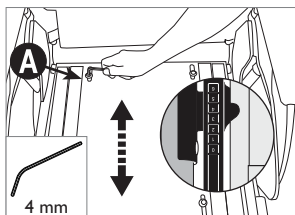

Sittdjup

Som standard, är sittdjupet justerbart i intervallet 39-45 cm. Sittdjup 36-50 cm finns som tillbehör.


- Lossa de fyra skruvarna **A** i sittplattan
- Dra sitsplattan framåt eller bakåt. Använd måtskalan som vägledning
- Dra åt skruvarna

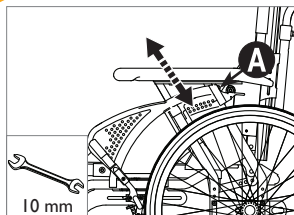

Armstöd

Armstöden är steglöst ställbara i höjd, för optimalt stöd av armarna.


- Lossa skruven **A**
- Höj eller sänk armstödet till önskad position.
- Använd måtskalan som en guide
- Dra åt skruven

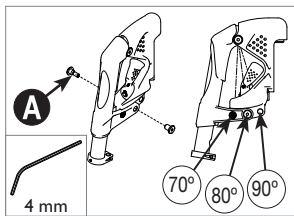

Benstödsvinkel

För att säkerställa optimal sittställning, kan fotstödet placeras i 70 °, 80 ° eller 90 ° vinkel.

- Ta bort skruven **A**
- Dra eller skjut benstödet till önskad vinkel
- Placera skruven i rätt hål och dra åt

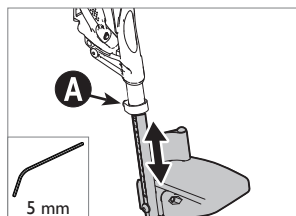


Benstöd

Längden ner till fotplattan kan justeras steglöst.


- Lossa fästskruven **A** ungefär 5 mm
- Justera benstödet till önskad längd och dra åt skruven
- Använd måtskalan som en guide

Användning av rullstolen

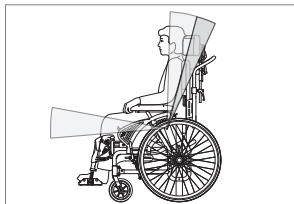


Tilt

Sitstilt gör det möjligt för brukaren att uppnå viktig ändring i sittställningen under dagen. Rullstolens balanspunkt bibehålls oavsett användning av sitstilt och förbättrar hantering och säkerhet. Vid användning av tilt öppnas ryggvinkeln 8°.

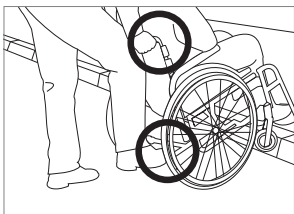

Komma över hinder

Deaktivera tipskyddet vid trottoarkanter eller liknande. Placera sedan en fot på tipskyddet medan du styr med körbygeln/körhandtagen.

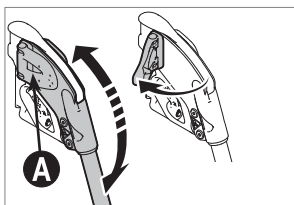

Benstöd

Benstöden svängs in/ut och är avtagbara för enklare förflyttning till och från rullstolen.

- Benstöden kan frigöras genom att vrida spaken **A** inåt eller utåt.
- Benstöden kan lyftas rakt upp och fullständigt avlägsnas om detta är önskvärt. För att sätta tillbaka benstöden igen, gör operationen i omvänd ordning. Spaken låser automatiskt.

Beroende på brukarens funktionshinder kan du tilta stolen på olika sätt:

Brukarmanövrerad tilt:


Brukarmanövrerad tilt gör brukaren oberoende vid positionsändringar .


- Aktivera spaken för tilt med ett finger; flytta överkroppen bakåt - vid nödvändigt/om möjligt tryck försiktigt mot armstöden
- Aktivera spaken för tilt med ett finger; flytta överkroppen framåt - vid behov/om möjligt drag försiktigt med armarna i armstöden

Ledsagarmanövrerad tilt:

- Ledsagare trycker in tilthandtaget, brukaren lutar sig framåt/bakåt
- Ledsagare trycker in tilthandtaget, brukaren drar sig själv framåt/bakåt med hjälp av armstöden


Balanspunkten för tilt kan ställas in så det fungerar enklast i förhållande till brukarens funktion och vikt.

 Läs mer om justering av balanspunkten för sitstilt i bruksanvisningen.

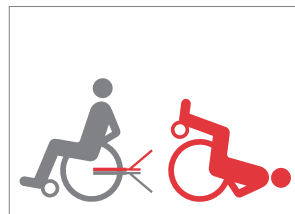

Tippskyddet

Tippskyddet säkrar rullstolen från att tippa bakåt. Använd alltid tipskyddet när rullstolen används. Kom ihåg att aktivera tipskyddet igen efter passering av hindret.

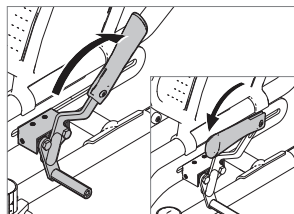


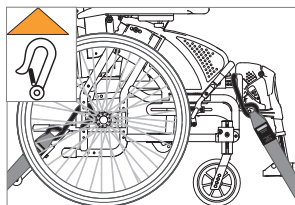
Bromsar

Dra bromsspaken mot dig för att låsa bromsen.

För att underlätta sidoförflyttning, kan bromsarmen vikas ner.


- Dra bromshandtaget uppåt och fäll ner det.

 Bromsarna är enbart utformade för att hålla stolen när den står stilla. De får inte under några omständigheter användas som färd bromsar. I sådana tillämpningar, rekommenderar vi vårdarbroms (tillbehör).



Kraschtestad

Rullstolen kan användas som passagerarsäte i en bil och har godkänts enligt ISO 7176-19. Rullstolen är märkt med fyra fästpunkter som måste användas vid fästsättning i motorfordon.

 Läs mer om säkerhet i bil i rullstolens bruksanvisning.



Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal

T: +46 (0)31 748 37 00

E: post@sunrisemedical.se

www.SunriseMedical.se