


MONTERINGSANVISNING

# Elektrisk rygg och sitstilt

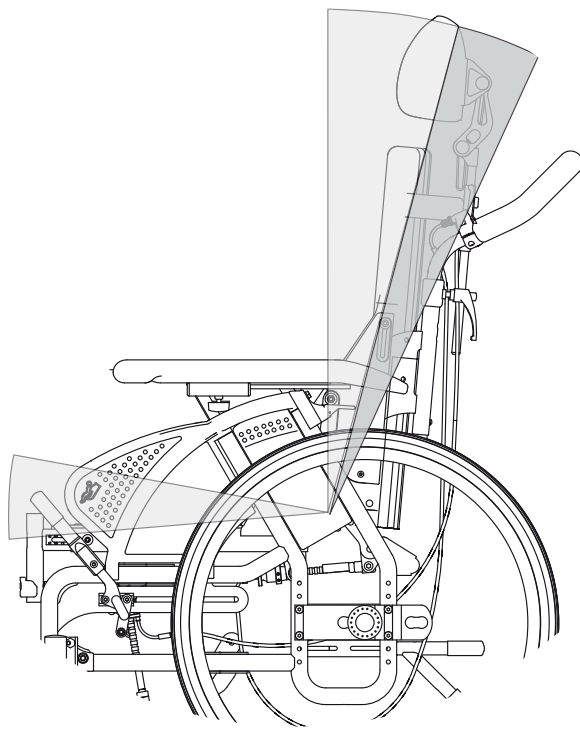


**Benämning**

Elektrisk rygg och sitstilt Emineo

**Artikelnummer**


3019505









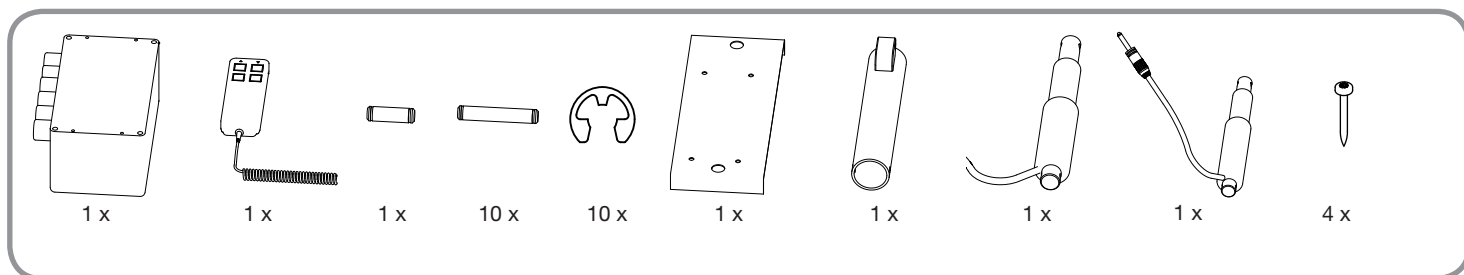




## Förberedelser - demontering av justeringsmekanism för rygg och tilt

- 1 Demontera sitsplattan genom att skruva loss de fyra skruvarna **A** (behåll skruvarna).
- 2 Demontera justeringsmekanismen för ryggen **B**.
- 3 Demontera justeringsmekanismen för sätet **C**.
- 4 Demontera vajrar och handtag **D**.

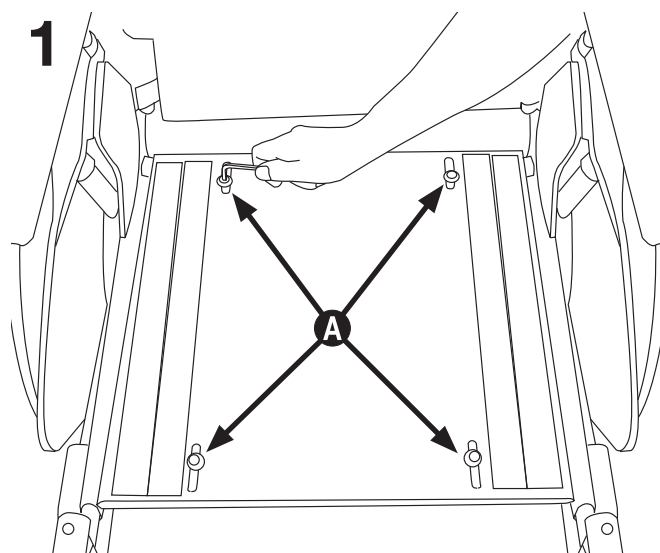


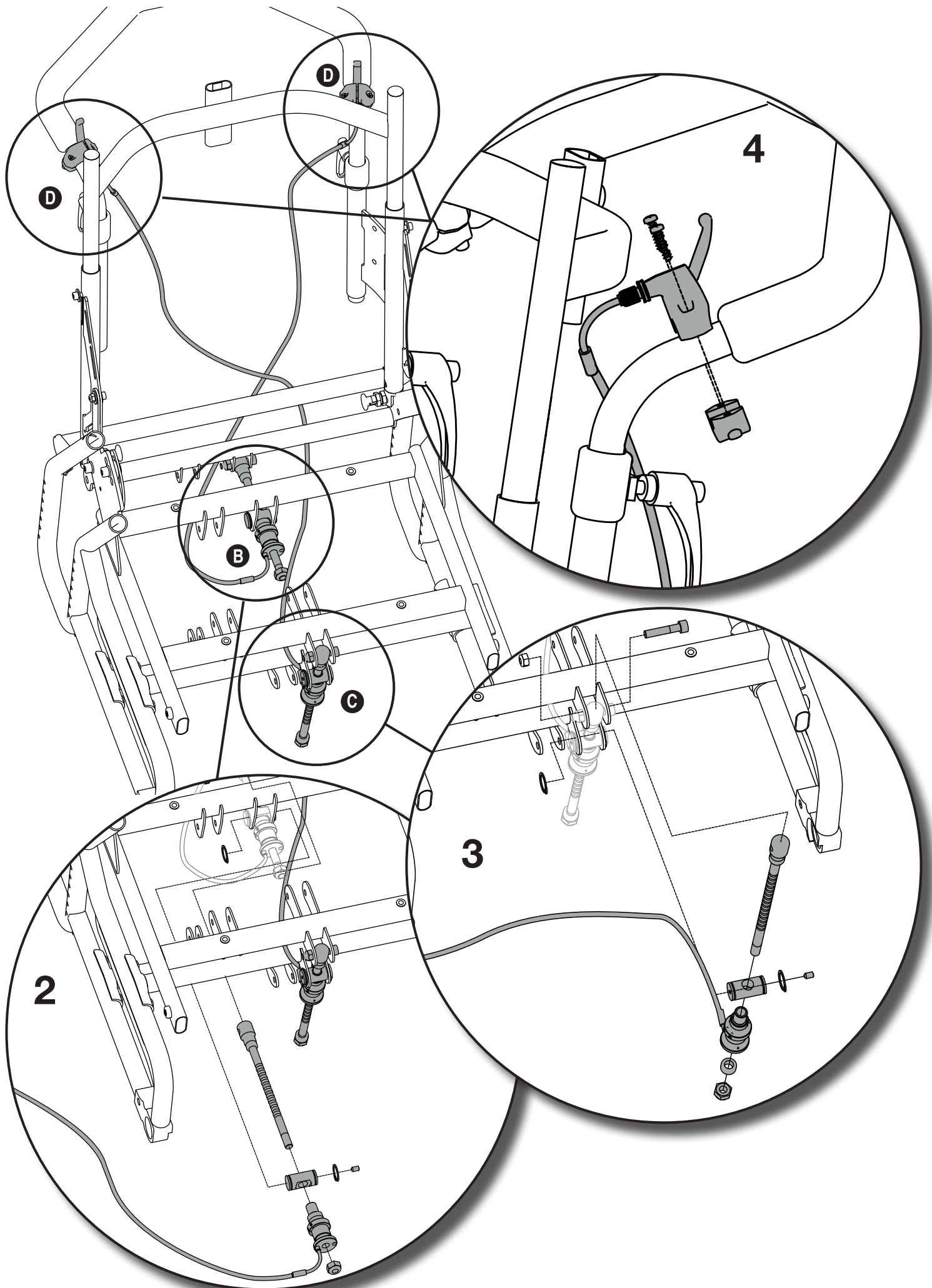

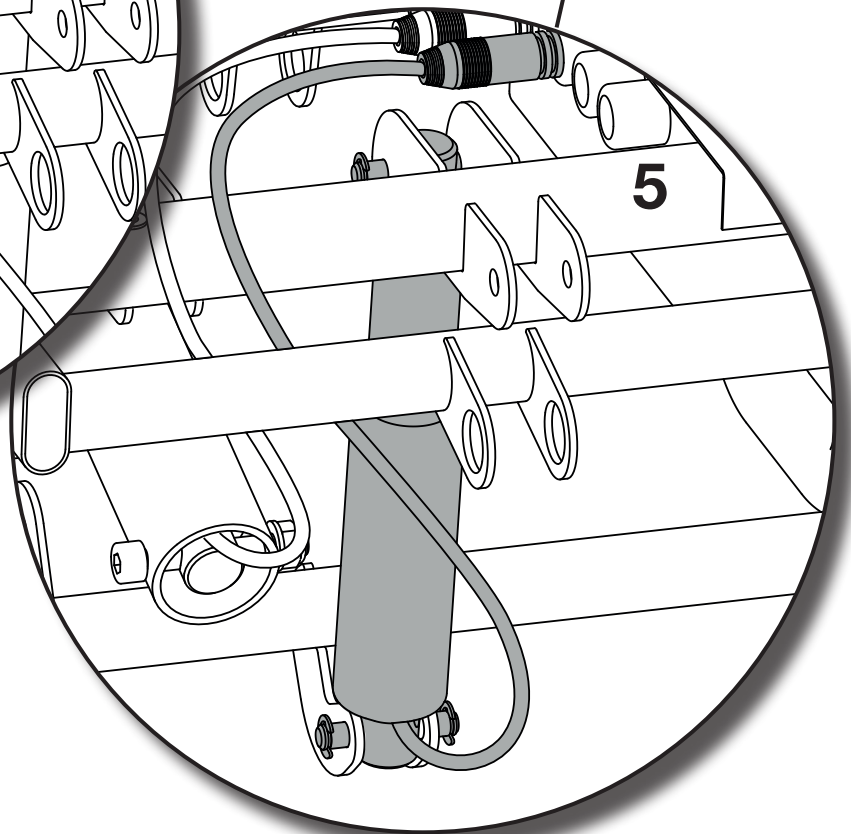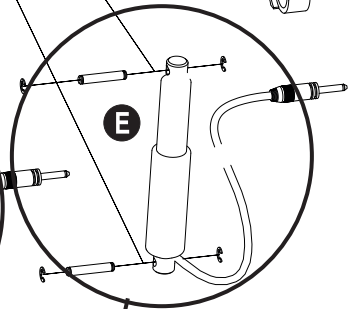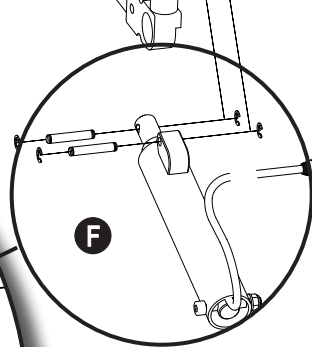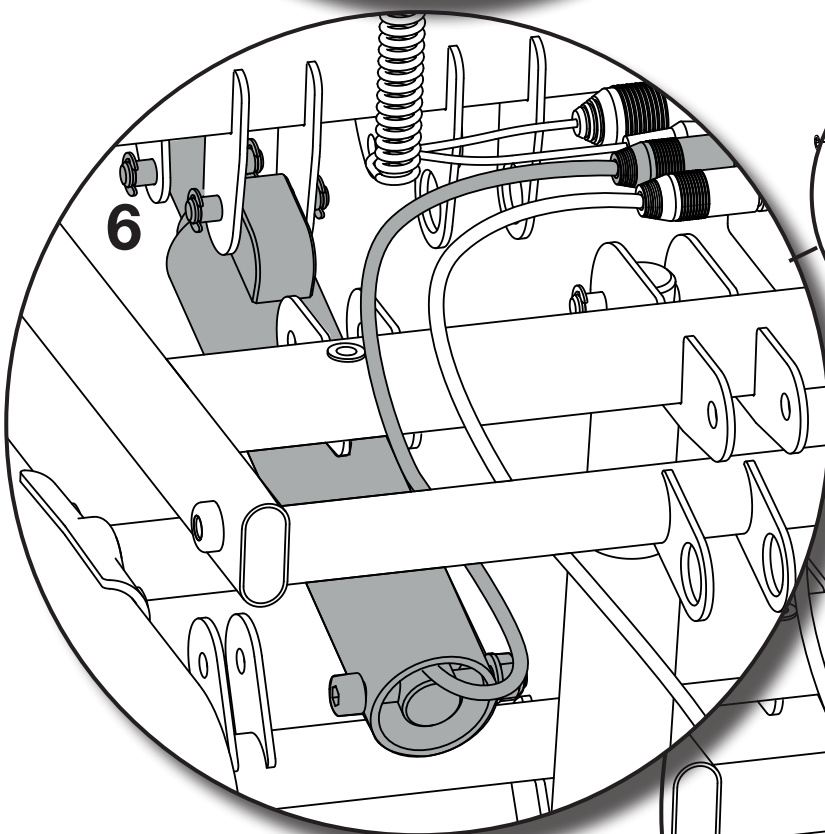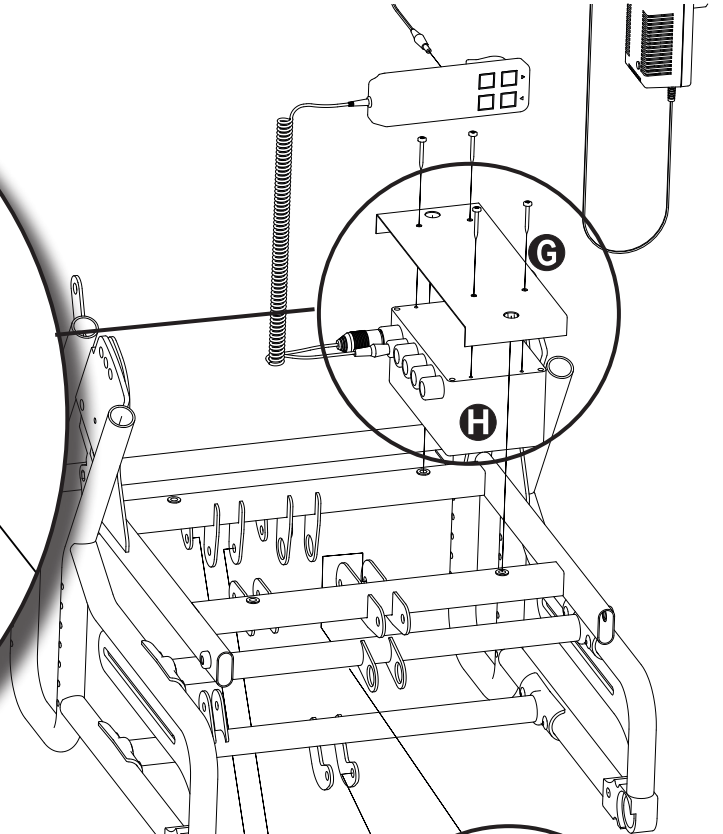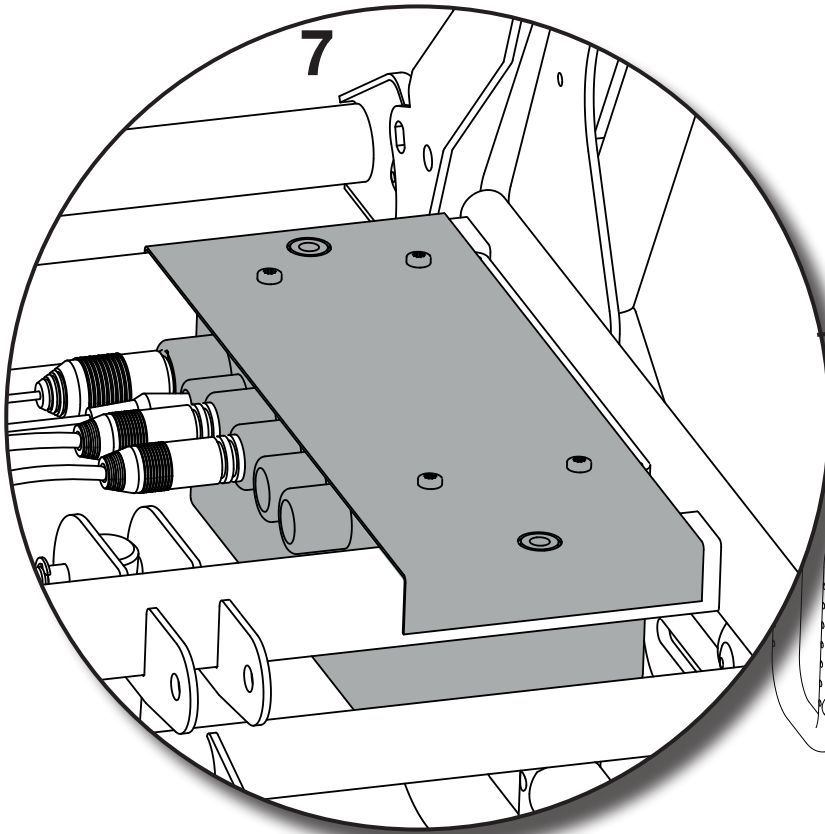

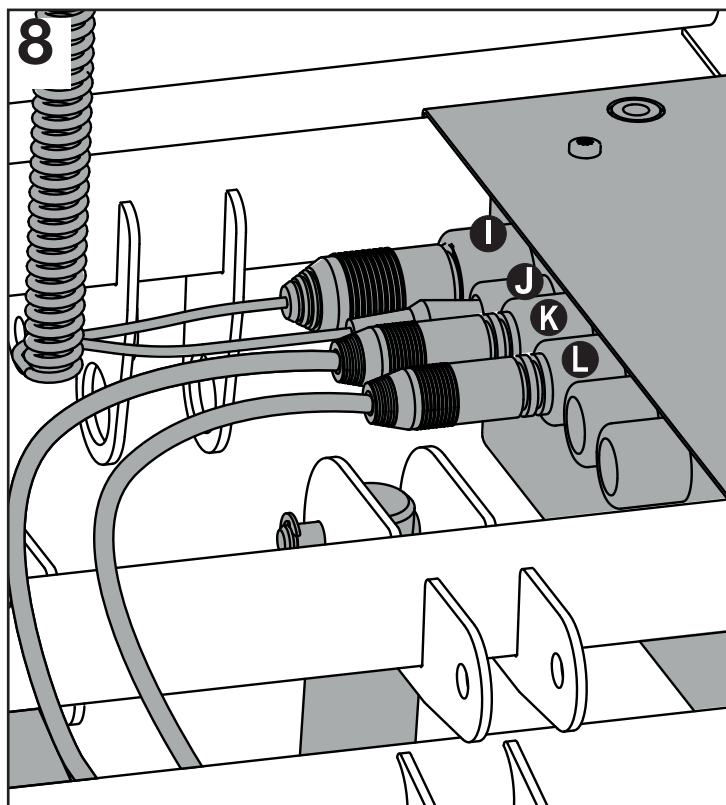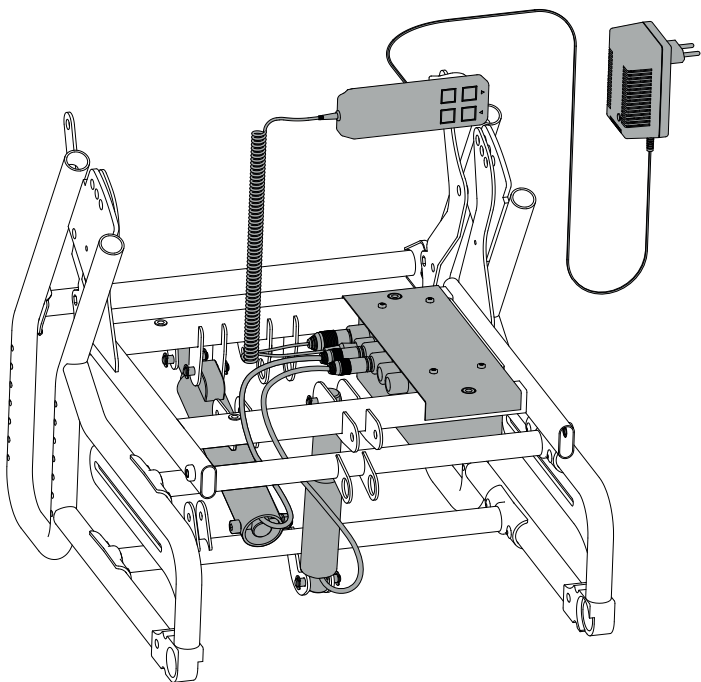

- 5 Montera ställdonet för sätet **E**.
- 6 Montera ställdonet för ryggen **F**.
- 7 Skruva ihop fästplattan **G** och styrenheten **H**.  
Placera fästplattan och styrenheten på sitsramen,  
se illustration. (Styrenheten sätts fast vid ramen när  
du när du sätter ihop sätesplattan.)
- 8 Dra kablarna till styrenheten
  - I** handkontroll
  - J** laddningskabel
  - K** ställdon för rygg
  - L** ställdon för sitstilt
- 9 Sätt tillbaka sitsplattan, se till att styrenheten  
är fastsatt på sätesramen när du skruvar fast  
skruvarna.

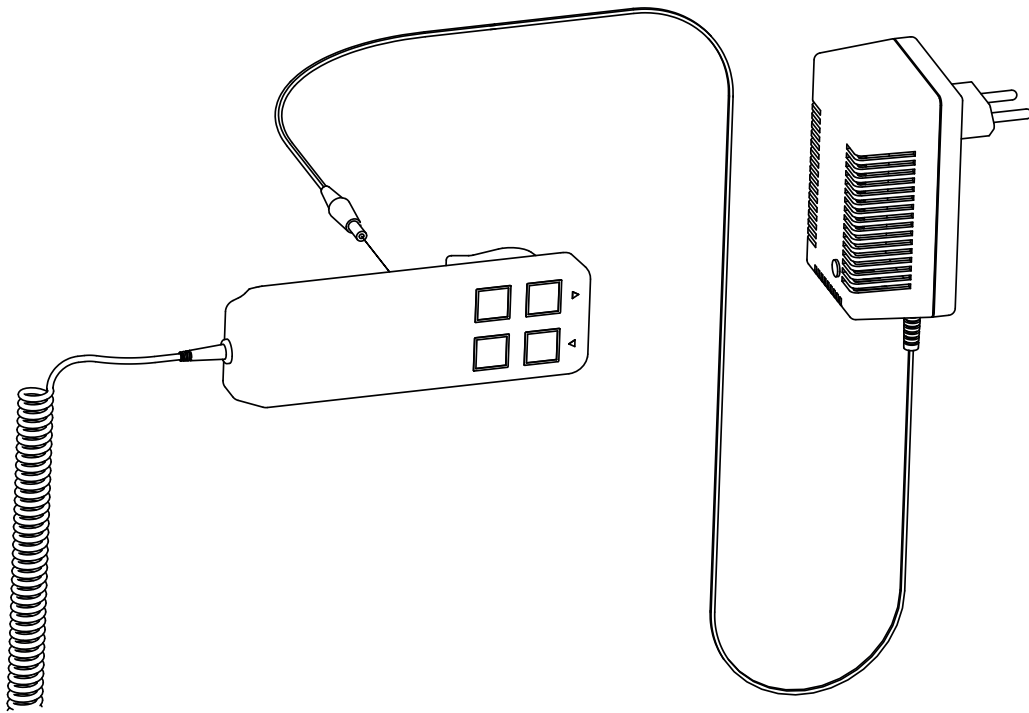

### **Laddning**

Sätt i laddningspluggen i handkontrollen. Anslut laddaren till strömförsörjningen (230 V). Indikatorn på laddaren lyser grönt när batteriet är fulladdat.

**Använd inte rullstolen när den laddas.**

**Ladda batterierna när rullstolen inte används.**

### **Rengöring**

Ställdon och kontrollbox måste demonteras om du tvättar rullstolen med vattenslang eller högtryckstvätt.





Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88  
E: [customerservice@sunrisemedical.nl](mailto:customerservice@sunrisemedical.nl)  
[www.SunriseMedical.eu](http://www.SunriseMedical.eu)



Sunrise Medical AB  
Neongatan 5  
431 53 Mölndal  
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00  
F: +46 (0) 31 748 37 37  
E: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)  
[www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)