


# Hjulblock

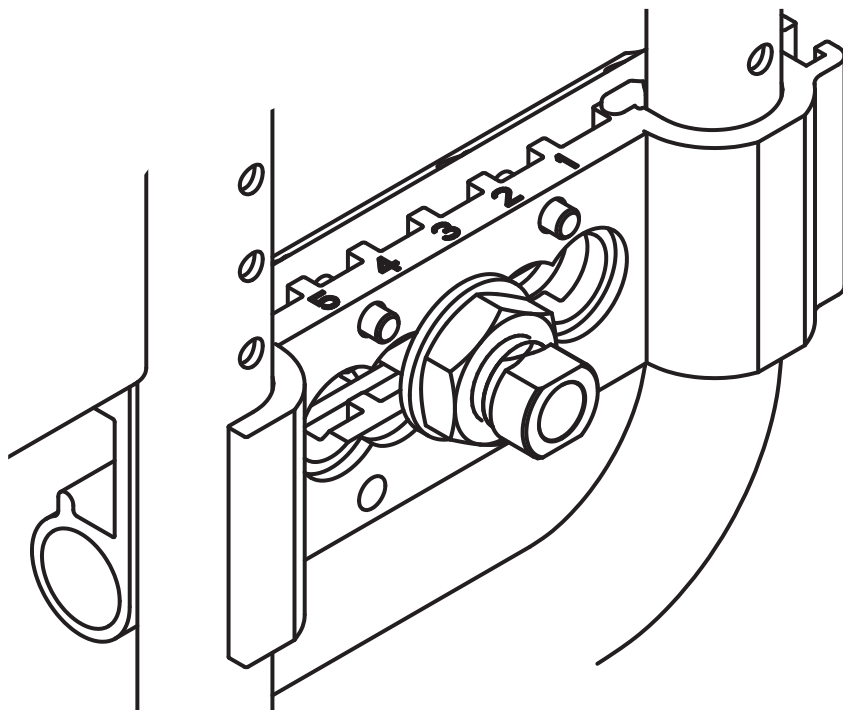



**Benämning**

Hjulblock One-tool






**Artikelnummer**

3307159



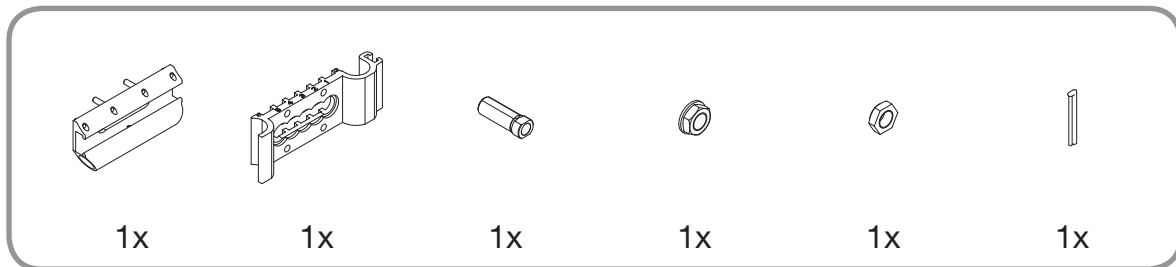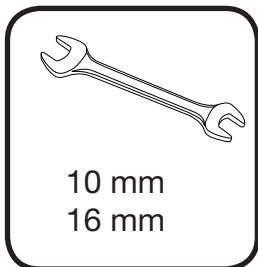

- 1 Placera det yttre hjulblocket på ramen.
- 2 Skjut in låsbrickan (A) in i spåret på det yttre hjulblocket för att fästa det på ramen.
- 3 Tryck ihop det inre och yttre hjulblocket. Det är viktigt att se till att stiften i hjulblocket går in i hålen i ramen. Läs skalan på ramen för rätt sitshöjd. Skjut in låsmuttern (B) in i spåret i det inre hjulblocket.
- 4 Skruva i Quick Release-adaptorn med mutter och bricka. Dra Quick Release-adaptorn till 1:e eller 5:e spåret i hjulbasen, och använd en 16 mm nyckel för att dra åt. Försätt skruva tills bara änden på Quick Release-adaptorn är synlig på utsidan.
- 5 Skjut Quick Release-adaptorn till korrekt position enligt tyn-gdpunkten. (De parallella ytorna på Quick Release-adaptorn ska vara horisontella för att du ska kunna skjuta adaptorn) Det är viktigt att se till att Quick Release-adaptorn ligger i spåret innan du använder en 27 mm nyckel för att dra åt muttern.

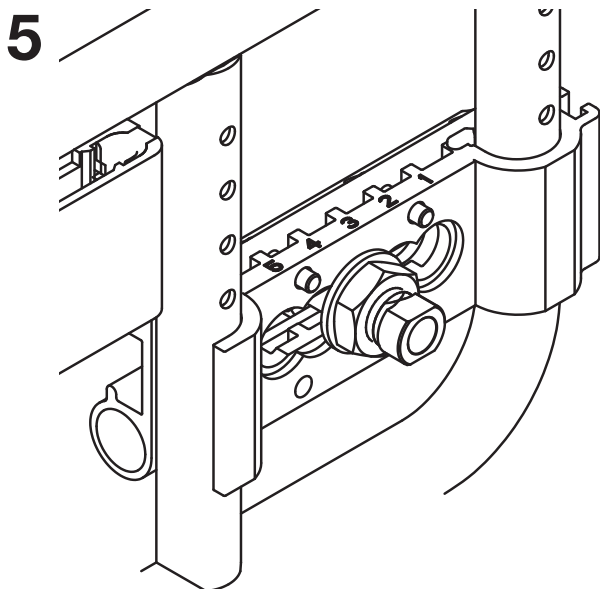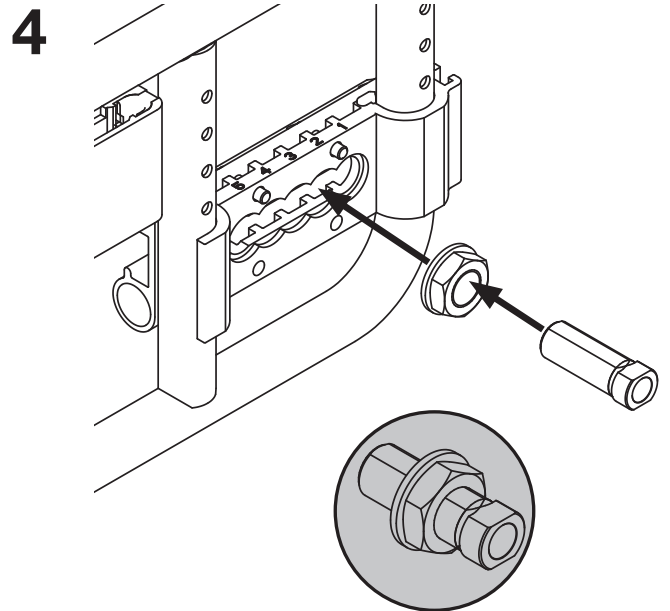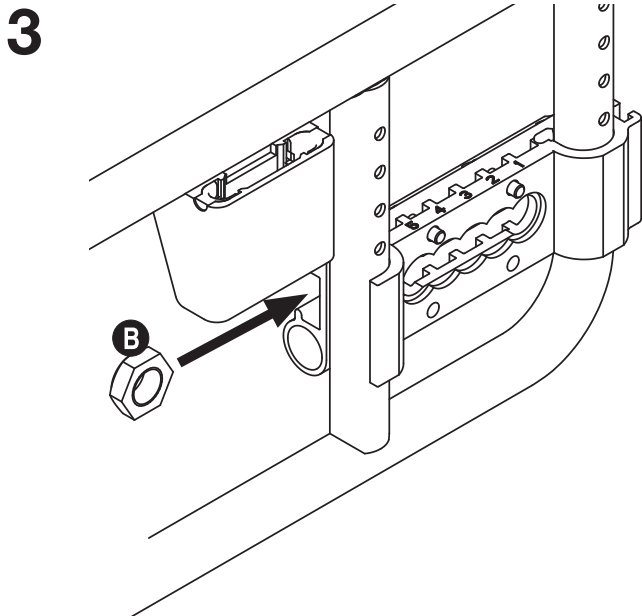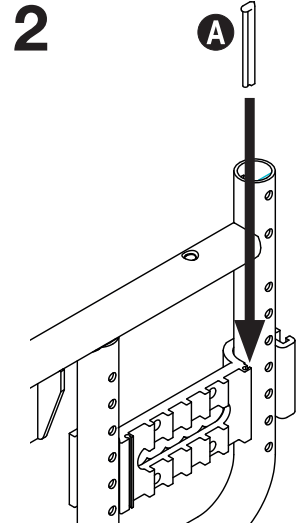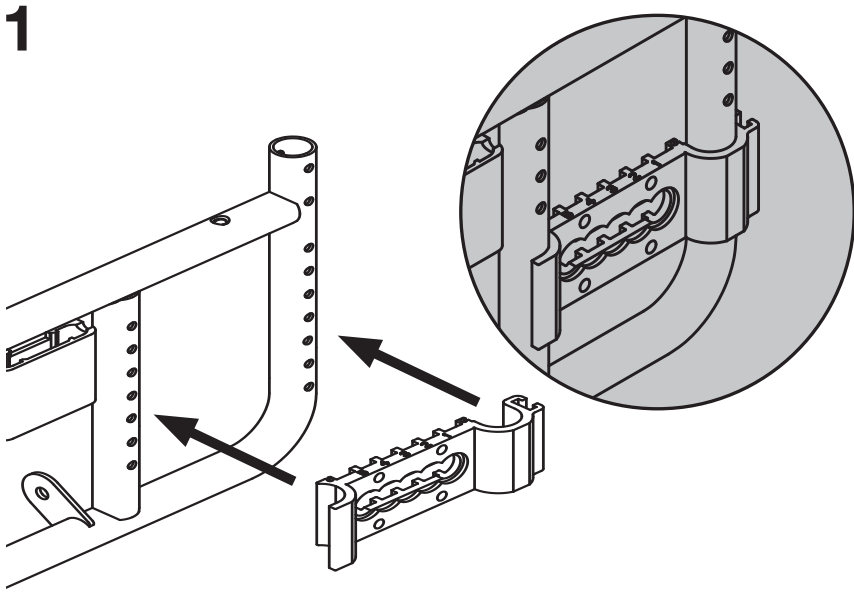



Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88  
E: [customerservice@sunrisemedical.nl](mailto:customerservice@sunrisemedical.nl)  
[www.SunriseMedical.eu](http://www.SunriseMedical.eu)



Sunrise Medical AB  
Neongatan 5  
431 53 Mölndal  
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00  
F: +46 (0) 31 748 37 37  
E: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)  
[www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)