

LECKEY[®]

Everyday Activity Seat

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE

MANUALE D'USO





Il dispositivo Everyday Activity Seat è un sistema di seduta disegnato appositamente per essere utilizzato in casa ed a scuola. È disponibile in tre misure con seduta regolabile in altezza, profondità e ampiezza per alloggiare utenti che vanno da 1 anno all'età adulta. Questo manuale vi mostrerà come riuscire in modo veloce e semplice ad utilizzare tutte le sue funzioni. Le istruzioni riguardanti la sicurezza e la manutenzione vi assicureranno un uso del prodotto duraturo nel tempo.

Contenuti

- 01 Destinazione d'uso
- 02 Dichiarazione di conformità
- 03 Termini di Garanzia
- 04 Documentazione sulla Storia del Prodotto
- 05 Istruzione all'uso
- 06 Informazioni sulla Sicurezza
- 07 Come Rimuovere dall'Imballo ed Assemblare
- 08 Inserire le imbottiture
- 09 Regolazioni personalizzate per la gestione della postura
- 10 Adattamenti Frequenti per un Uso Quotidiano
- 11 Informazioni sulla Pulizia e sulla Manutenzione
- 12 Controllo Quotidiano del Prodotto
- 13 Controllo Annuale del Prodotto
- 14 Riassegnazione dei prodotti Leckey
- 15 Assistenza Prodotto
- 16 Informazioni Tecniche



1. Destinazione d'Uso

Il dispositivo Everyday Activity Seat è disponibile in 3 misure ed è disegnato per soddisfare i bisogni di bambini con disabilità. La misura 1 è per bambini di età compresa tra 1 e 6 anni, la misura 2 è per bambini tra i 5 ed i 12 anni e la misura 3 è per adolescenti tra gli 11 ed i 18 anni. La portata massima è rispettivamente 30 kg, 50 kg e 100 kg.

2 Dichiarazione di Conformità CE

Il produttore, James Leckey Design Ltd., dichiara, sotto la propria e unica responsabilità, che Il dispositivo Everyday Activity Seat è conforme ai requisiti della direttiva 93/42/CEE e della norma EN 12182 – Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova.

3 Condizioni della garanzia

1) Le riparazioni o le sostituzioni saranno eseguite dal rivenditore autorizzato Sunrise Medical.

2) Qualora si rendesse necessario fare esaminare il prodotto durante il periodo di validità della garanzia, avvisare immediatamente il rivenditore autorizzato Sunrise Medical, fornendo tutte le informazioni relative al problema verificatosi. Nel caso in cui l'utente si trovi in una località lontana dalla sede del rivenditore Sunrise Medical di riferimento, la riparazione o la sostituzione prevista dalle condizioni di garanzia potrà essere eseguita da un altro tecnico designato da Sunrise Medical.

3) Se è necessario fare riparare o sostituire una parte qualsiasi del prodotto in seguito a un difetto di materiale o di fabbricazione specifico, entro 24 mesi dalla data di acquisto dell'acquirente originale, e sempre che il prodotto sia ancora di sua proprietà, la parte o le parti saranno riparate o sostituite gratuitamente se inviate al rivenditore autorizzato.

Nota: questa garanzia non è trasferibile.

4) Per qualsiasi componente riparato o sostituito, l'utente beneficerà di queste disposizioni per il periodo rimanente della garanzia applicabile al prodotto.

5) I componenti sostituiti dopo la scadenza della garanzia originale sono coperti per altri 12 mesi.

6) Le parti soggette ad usura non saranno generalmente coperte da garanzia durante il periodo di garanzia a meno che non presentino dei chiari segni di logorio eccessivo dovuto direttamente a un difetto di fabbricazione. Queste parti includono, ma non si limitano a: rivestimento di stoffa, pneumatici, camere d'aria e parti simili.

7) Le condizioni della garanzia riportate sopra sono valide per tutte le parti del prodotto, per i modelli acquistati a prezzo pieno.

8) In circostanze normali, non si accetta alcuna responsabilità qualora sia stato necessario riparare o sostituire il prodotto come risultato diretto dei seguenti fattori:

a) Il prodotto o una sua parte non sia stato riparato o revisionato in base alle raccomandazioni del produttore, come indicato nel manuale d'uso e/o nel manuale di manutenzione. Non siano state usate solo parti originali.

b) Il prodotto, o parte di esso, siano stati danneggiati per negligenza, incidente o uso improprio.

c) Il prodotto, o parte di esso, sia stato modificato rispetto alle specifiche del produttore o le riparazioni siano state eseguite senza avere avvisato prima il tecnico autorizzato.

La garanzia è valida soltanto se il prodotto viene impiegato alle condizioni prescritte e secondo le destinazioni d'uso specifiche. NON montare componenti NON STANDARD che non siano stati approvati ufficialmente da Sunrise Medical.

4 Documentazione sulla storia del prodotto

Il vostro prodotto Leckey è un dispositivo medico di Classe 1 e, in quanto tale, dovrebbe essere prescritto, configurato o riassegnato da personale tecnico competente che è stato formato sull'uso di questo prodotto. Leckey consiglia di conservare una documentazione scritta che fornisca le informazioni relative a tutte le impostazioni, i controlli relativi alla riassegnazione del prodotto ed i controlli annuali.

5 Istruzione all'uso

(Clienti e Assistenti) Il vostro prodotto Leckey è un dispositivo medico di Classe 1 e, in quanto tale, Leckey raccomanda che genitori, insegnanti e assistenti che fanno uso di questa attrezzatura vengano messi a conoscenza delle seguenti sezioni del presente manuale da personale tecnico competente.

Sezione 6

Informazioni sulla sicurezza

Sezione 9

Regolazioni personalizzate per la gestione della postura

Sezione 10

Adattamenti Frequenti per un Uso Quotidiano

Sezione 11

Informazioni sulla Pulizia e sulla Manutenzione

Sezione 12

Controllo Quotidiano del Prodotto

Leckey consiglia di conservare documentazione scritta di tutti coloro abbiano constatato il corretto utilizzo di questo prodotto.

Firma e timbro del rivenditore

6 Informazioni sulla Sicurezza



6.1 Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo.



6.2 Gli utenti non dovrebbero mai essere lasciati da soli mentre utilizzano prodotti Leckey.



6.3 Applicare al prodotto solamente componenti approvati da Leckey. Non apportare alcuna modifica al prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe mettere in pericolo l'utente o l'assistente ed invalidare la garanzia.



6.4 Qualora ci fossero dubbi sulla persistenza dell'uso in sicurezza del prodotto o nel caso in cui alcune sue parti dovessero rompersi, si prega di interrompere l'uso del prodotto e contattare il nostro customer service o il rivenditore locale il prima possibile.



6.5 Controllare che tutte le parti siano ben assicurate prima di alloggiare l'utente nel prodotto. Per alcune parti è necessario l'utilizzo di specifici strumenti forniti insieme al prodotto. Mantenere gli attrezzi lontano dalla portata dei bambini.



6.6 Per ragioni di sicurezza, agganciare la cinghia pelvica una volta alloggiato l'utente nell'ausilio.



6.7 Quando il prodotto sia fermo assicurarsi che tutte e quattro le rotelle siano state bloccate e rivolte verso l'esterno. Ciò è molto importante quando l'ausilio è in posizione basculata o quando lo schienale è reclinato.



6.8 Quando l'ausilio è utilizzato controllare cortesemente che la regolazione in altezza e di basculazione siano bloccati e che non possano essere sbloccati accidentalmente, specialmente se sono presenti bambini.



6.9 Il dispositivo Everyday Activity Seat non è una sedia a rotelle e nonostante la mobilità sia una sua caratteristica sconsigliamo di utilizzarla su superfici scosese. Tutte le dovute attenzioni e cure devono essere adottate nello spostamento di un utente da un dispositivo ad un altro.



6.10 L'Everyday Activity Seat non è stata sottoposta al crash test e perciò non può essere utilizzata sui mezzi di trasporto.



6.11 Non lasciare mai il prodotto su una superficie con una pendenza superiore ai 5 gradi. Ricordare sempre di bloccare tutte le rotelle.



6.12 Utilizzare il maniglione solo per condurre e muovere l'ausilio da una parte all'altra. Per tale scopo non tirare mai l'ausilio dal tavolino.



6.13 Il prodotto contiene componenti che potrebbero costituire un rischio di soffocamento per bambini piccoli. Controllare sempre che le manopole di bloccaggio e i bulloni raggiungibili dal bambino siano sempre ben serrati.



6.14 I prodotti Leckey sono conformi al regolamento sulla sicurezza antincendio ai sensi della norma EN 12182. Tuttavia, il prodotto contiene componenti in plastica e dovrebbe essere quindi tenuto lontano da tutte le fonti dirette di calore come fiamme libere, sigarette, riscaldatori elettrici e a gas.



6.15 Non posizionare mai oggetti caldi sul Tavolino in quanto potrebbero danneggiare la plastica.



6.16 Pulire regolarmente il prodotto. Non utilizzare detersivi abrasivi. Effettuare regolarmente controlli di manutenzione per assicurarsi che il prodotto funzioni correttamente.



6.17 Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato in luoghi chiusi e quando non utilizzato deve essere riposto in un luogo asciutto e fresco con una temperatura compresa tra i 5 ed i 40 gradi centigradi.

Come rimuovere dall'imballo ed assemblare

Controllo dei componenti

Congratulazioni per l'acquisto dell'Everyday Activity Seat. Tutti i componenti ordinati sono contenuti in buste di polietilene etichettate. Controllare che siano presenti tutti i componenti ordinati.



Tenere i sacchetti di polietilene lontano dalla portata dei bambini.

Attrezzo Multiuso

Alcune regolazioni richiedono l'utilizzo di un attrezzo multiuso in dotazione insieme alla vostra sedia.



7.1 Fissare i supporti per i piedi / le cinghie della pedana poggiapiedi (pedana poggiapiedi in legno)

Per fissare i supporti per i piedi svitare la manopola e le rondelle dal sandalo. Posizionare il sandalo nella pedana poggiapiedi, inserire la vite nella fessura e riposizionare le rondelle e la manopola. Ripetere l'operazione per l'altro supporto.

Fissare le cinghie della pedana poggiapiedi (pedana poggiapiedi in legno)

Posizionare gli strappi della pedana poggiapiedi per accogliere i piedi dell'utente e segnare la posizione del foro della cinghia. Effettuare un foro di 7mm nel legno nelle posizioni pre-marcate del foro della cinghia. Fissare la cinghia della pedana poggiapiedi alla base in legno mediante l'utilizzo di bullone, rondella e dado.

Regolare le Cinghie della Pedana Poggiapiedi

Per rimuovere le cinghie imbottite della pedana poggiapiedi staccare le cinghie dal velcro. Per fissare le cinghie imbottite intorno al piede dell'utente attaccare le cinghie al velcro.




7.2 Fissare i braccioli

Inserire i braccioli nelle apposite staffe e fissarli all'altezza desiderata stringendo la manopola (A).




7.3 Fissare il tavolino

Per fissare il tavolino grigio, chiaro o nero, inserire le barre nelle guide situate al centro dei braccioli (A). Per fissare il tavolino in legno inserire la singola barra nella guida situata sotto il bracciolo destro o sinistro a seconda della posizione che si vuole adottare (B). Una volta che il tavolino (chiaro, nero, grigio o in legno) si trova in posizione stringere la manopola (C) per fissare il tutto.

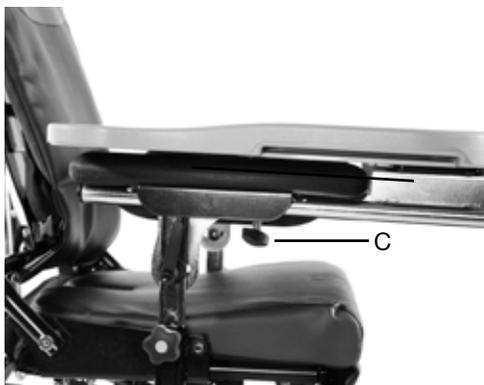

7.4 Fissare i supporti bacino

Svitare la manopola (A) situata sotto la base dell'ausilio. Posizionare la staffa del supporto fianchi laterale nella vite (B) e riposizionare la manopola (C).

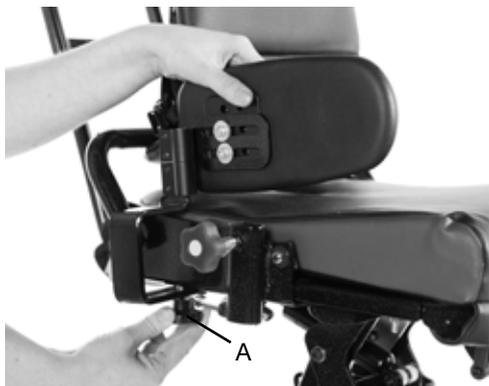

7.5 Fissare i supporti laterali del tronco swing away

Per fissare i supporti laterali del tronco allineare la staffa con la fessura nello schienale di metallo. Inserire i due bulloni nel piccola fessura ovale, nella fessura dello schienale e nelle due parti scorrevoli situate sulla staffa ed avvitare.

Per ottenere più altezza grazie ai supporti laterali basta toglierli, capovolgerli e riattaccarli mettendo il supporto di sinistra a destra dello schienale e viceversa.



7.6 Fissare le prolunghe imbottite per le spalle

Per fissare le prolunghe imbottite per le spalle allineare la staffa con le fessure situate sullo schienale. Inserire i due bulloni e le rondelle attraverso la fessura dello schienale e fissarle nella staffa della prolunga.




7.7 Fissare il pomo

Inserire la staffa del pomo nel vano. Inserire la manopola (A) e fissare.



7.8 Fissare la pedana poggiapiedi

Per la misura 1 e 2 far scivolare la pedana sopra il tubo dell'angolo del polpaccio (A) e fissare il bullone (B). Per la misura 3 far scivolare la pedana sopra i tubi di supporto dell'angolo del polpaccio (C) e fissare i bulloni su ogni supporto del polpaccio.

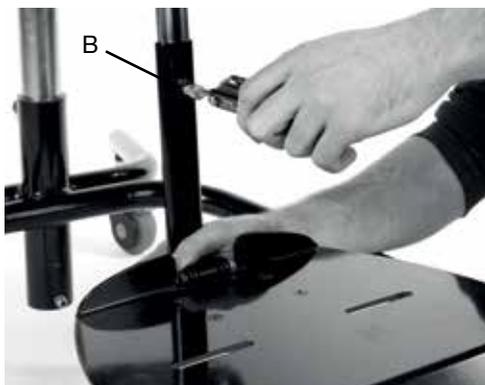

7.9 Fissare le imbottiture laterali per le ginocchia

Per la misura 1 e 2 posizionare l'ausilio nella posizione di massima profondità, svitare la manopola situata sotto la base dell'ausilio. Posizionare le imbottiture laterali per abduzione nella vite (A) ed avvitarla la manopola (B).

Per la misura 3 allineare le imbottiture laterali per abduzione con la fessura situata nella parte frontale della base della seduta quando l'ausilio si trova nella posizione di massima profondità. Far scivolare fino al raggiungimento della posizione desiderata, inserire il bullone ed avvitarlo (C).



7.10 Fissare la cinghia pelvica

Aprire le fibbie (A). Attaccare ognuna delle 4 cinghie attraverso le fibbie e continuare a farle passare attraverso la fibbia ad occhiello supplementare (B). Abbottonare per bloccare (C).



7.11 Fissare la staffa di raccordo del poggiatesta Mygo

Infilare le viti attraverso il Poggiatesta Mygo, la staffa di raccordo ed il Blocco Distanziatore. Allineare ed inserire quanto assemblato nei fori nella lastra che si trova sulla parte posteriore. Fissare ogni vite con un bullone.



7.12 Fissare la fascia dei polpacci

Avvolgere la fascia intorno alle due barre di supporto dei polpaccio. Allineare i bottoni automatici sulla striscia di velcro e chiudere.



Una volta fissata la fascia far scivolare i bottoni nella parte posteriore del supporto per proteggere le gambe dell'utente.



7.13 Fissare il manubrio di spinta

Per la misura 1 il maniglione viene fissato alle staffe del telaio inserendo i due tubi inferiori nelle rispettive guide come mostrato (A). Per le misure 2 e 3 il maniglione viene fissato alla base dell'ausilio mediante l'inserimento delle due assi inferiori nelle rispettive guide come mostrato (B e C).

Il maniglione è munito di bottoni automatici di sicurezza che devono essere premuti quando vengono inserite i tubi inferiori. Spingere i tubi fin quando i bottoni automatici non sporgono dall'altra parte delle guide. Per la misura 1 e 2 fissare il maniglione stringendo le viti (D). Per la misura 3 fissare il maniglione stringendo e chiudendo le manopole (E).


Controllare regolarmente bulloni e manopole per assicurarsi che siano fissati, specialmente quando il dispositivo viene utilizzato su superfici scoscese o in pendenza.

A





**Inserire i
Cuscini**

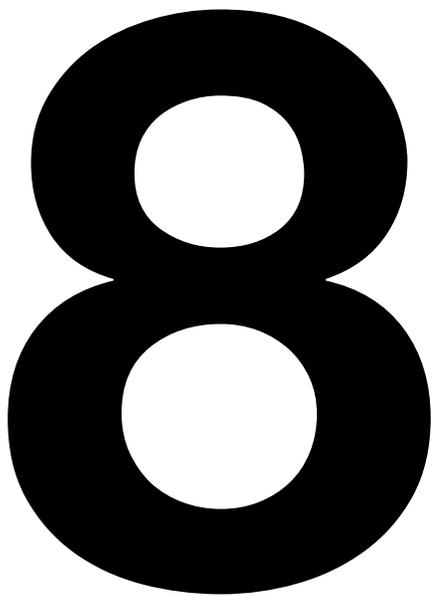


8.1 Cuscino dello schienale

Il cuscino dello schienale può essere fissato semplicemente posizionandolo nello schienale e spingendo verso il basso per abbottonare l'automatichetto nella parte alta. Infine assicurarlo al velcro posizionato sullo schienale. Successivamente agganciare la fascia elastica al gancio. È possibile scegliere tra due fasce elastiche: una più corta per una posizione più bassa ed una seconda più lunga per una posizione più alta.



8.2 Cuscino del sedile

Il cuscino del sedile deve essere posizionato facendo pressione per far abbottonare l'automatico (A) nella parte posteriore del sedile. Successivamente piegare il rivestimento sotto la parte frontale dell'ausilio ed abbottonare gli automatici (B). Al centro del cuscino del sedile è presente una sezione di tessuto che può essere utilizzata per coprire la staffa del divaricatore quando questo non è assente. Tirare in basso questa sezione di tessuto al di sotto del sedile ed attaccarla utilizzando le strisce di velcro posizionate su ogni lato. Quando il pomo è posizionato ripiegare la sezione sotto il sedile.

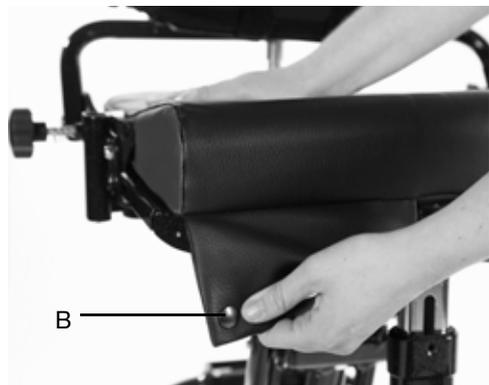

8.3 Rivestimento del supporto laterale del tronco

Per fissare il rivestimento del supporto laterale del petto, far scivolare il rivestimento sul supporto laterale con le cerniere posizionate verso l'esterno. Far passare la fibbia in plastica attraverso il rivestimento (A) ed unire le cerniere situate nella parte posteriore del rivestimento per chiudere (B).



8.4 Supporto per il bacino

Far scorrere i rivestimenti sui componenti del supporto laterale dei fianchi con le cerniere rivolte verso l'esterno (A). Chiudere le cerniere situate nella parte posteriore del rivestimento per chiudere (B).



8.5 Rivestimento della staffa del supporto laterale dei fianchi

Far scivolare il rivestimento intorno alla staffa fino a quando non copre il meccanismo ad angolo. Far passare la linguetta oltre il meccanismo ad angolo e abbottonare l'automatico.



8.6 Rivestimento per il supporto del poggiatesta sagomato

Posizionare il rivestimento sopra il supporto e chiudere la cerniera.




8.7 Cintura pettorale

La cintura pettorale può essere fissata agganciando le fibbie della stessa alle fibbie che si trovano sui lati del supporto laterale.



8.8 Fissare lo stabilizzatore pettorale

Lo stabilizzatore è fornito con due cinghie laterali regolabili, due cinghie oblique regolabili, quattro fibbie a sgancio rapido (due con cinghie e due senza), due viti a passo corto, due bulloni a testa esagonale e 4 dadi di bloccaggio. Fissare le cinghie oblique e quelle laterali nella parte alta (A) e nella parte bassa (B) con l'aiuto di una chiave inglese e dell'attrezzo multiuso. Attaccare le cinghie della cintura obliqua oblique (C) con le due fibbie della parte alta e le due fibbie al lato.

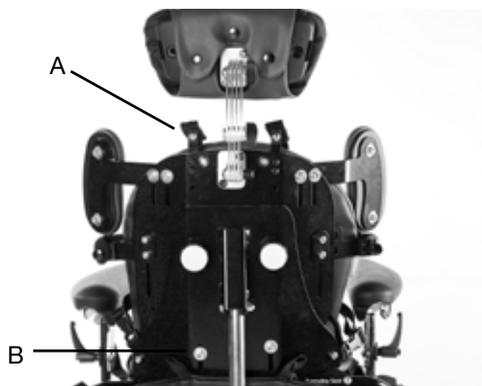

8.9 Rivestimento della imbottitura laterale per abduzione

Posizionare la cover sui supporti laterali per le ginocchia e chiudere le cerniere su entrambi i lati.



Regolazioni personalizzate per la Gestione della Postura

La regolazione del prodotto dovrebbe essere completata da una persona tecnicamente e clinicamente competente e preparata all'uso del prodotto. Leckey consiglia di conservare una documentazione scritta di tutti i setup clinici del prodotto.

Regolare l'altezza dello schienale , la profondità della seduta e l'altezza della pedana poggiapiedi prima di posizionare il bambino nell'ausilio. Quando il bambino è seduto è comunque possibile aggiustare le regolazioni.



9.1 Cinghia pelvica

Per regolazioni laterali aprire le fibbie, tirare le cinghie per stringere o rilasciare la fibbia per allentare a seconda della vestibilità necessaria (a). Per regolare il centro della cintura tirare l'anello a D situato sul velcro ed allentare ciascuna cinghia attraverso la fibbia per allentare la cintura. Per stringere la cintura tirare l'anello a D lontano dalla cinghia (b).



Assicurarsi che la cinghia sia assicurata alla fibbia ad occhio nel caso in cui la fibbia dovesse aprirsi accidentalmente.



9.2 Supporti laterali del bacino

Per regolare l'ampiezza dei supporti laterali del bacino, svitare la manopola (a) regolare i supporti ed avvitarla.

Per regolare la profondità svitare i due bulloni (b) con l'attrezzo multiuso in dotazione, regolare i supporti ed avvitarre i due bulloni.

Per regolare l'angolazione allentare il bullone (c). Regolare i supporti e stringere il bullone.



9.3 Altezza dello schienale

L'altezza complessiva dello schienale si regola svitando le due manopole e posizionando lo schienale in base all'altezza dell'utente. Una volta posizionato lo schienale avvitare le manopole. L'altezza può essere regolata ulteriormente una volta che l'utente è stato alloggiato. Quando l'altezza è bassa il cuscino deve essere posizionato intorno alla parte inferiore dello schienale e assicurato con il Velcro e i tiranti ad elastico



Fare attenzione a non ferirsi le dita durante le fasi di regolazione.




9.4 Angolazione dello schienale

Lo schienale può essere inclinato a piacimento svitando il bullone con l'attrezzo multiuso. Dopo aver posizionato lo schienale avvitare il bullone. Controllare sempre che lo schienale sia ben fissato al fine di mantenere la postura desiderata per il bambino.

L'angolazione dello schienale può essere regolata anche quando il bambino è posizionato nell'ausilio facendo attenzione a mantenere lo schienale con una mano.




Assicurarsi sempre che il bullone sia ben avvitato per evitare di mettere in pericolo l'incolumità del bambino o dell'assistente.

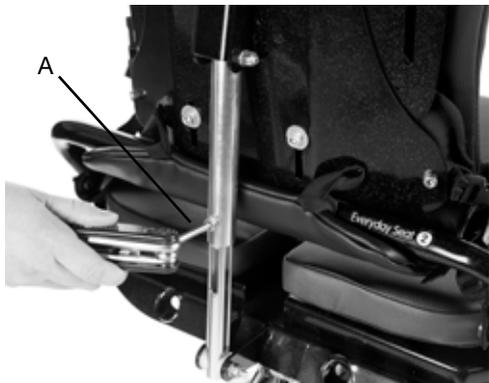

9.5 Profondità del sedile

Per regolare la profondità dell'ausilio svitare le manopole (A) posizionate lateralmente sotto l'ausilio, tirare il sedile verso se stessi fino al raggiungimento della profondità desiderata e avvitare le manopole.

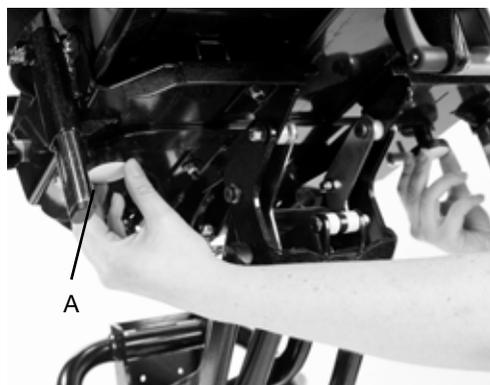

9.6 Altezza della pedana poggiapiedi

Per regolare l'altezza della misura 1 e 2 della pedana poggiapiedi svitare il bullone (A) situato frontalmente sul tubo del supporto del polpaccio e fare scivolare la pedana fino a raggiungere l'altezza desiderata avvitando il bullone per bloccarla. Per la misura 3 svitare i bulloni situati sui supporti per polpaccio (B). Far scivolare la pedana all'altezza desiderata avvitando i bulloni per bloccarla.



Controllare sempre che la pedana poggiapiedi sia ben assicurata per prevenire eventuali slittamenti dell'utente in avanti perché ciò potrebbe costituire un rischio di soffocamento se la cintura di bloccaggio del tronco o pettorale sono indossate.



9.7 Inclinazione della pedana poggiapiedi

Per regolare l'inclinazione della pedana poggiapiedi della misura 1 e 2 allentare la leva (A), posizionare la pedana all'inclinazione prescelta e stringere la leva per bloccarla. Per la misura 3 svitare il bullone (B), posizionare la pedana nell'inclinazione prescelta e stringere il bullone per bloccarla.



Fare sempre attenzione a non ferirsi le dita durante la regolazione.



9.8 Supporto sacrale

Per regolare l'altezza svitare i bulloni su entrambi i lati con il coltello multiuso in dotazione. Regolare il supporto alla giusta altezza e avvitare i bulloni.




Fare sempre attenzione a non ferirsi le dita durante l'operazione di regolazione del supporto sacrale.



9.9 Supporti laterali per il tronco

Svitare i bulloni (a) per regolare la profondità, l'altezza e l'inclinazione dei supporti laterali avvitando il bullone una volta ottenuta la posizione desiderata.

Utilizzare la manopola per distanziare i supporti laterali (b).

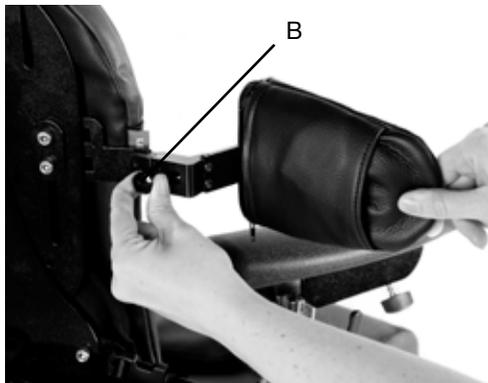

9.10 Pelotta frontale per il tronco

Per modificare la profondità della pelotta, sollevare il rivestimento frontale, regolare le cinghie di Velcro e riposizionare il rivestimento.



9.11 Stabilizzatore pettorale

Lo stabilizzatore pettorale, anche se aperta rimane fissato all'ausilio mediante gli agganci laterali (A). Dopo aver posizionato il bambino nel sistema di seduta portare lo stabilizzatore pettorale sul davanti ed agganciare la fibbia sul lato opposto (B). Tutte la fibbie di connessione sono regolabili.

A



B



9.12 Supporti per gli arti inferiori

Per posizionare i sandali svitare la manopola situata sotto la pedana poggiapiedi, selezionare la posizione ed avvitare la manopola. Per posizionare i piedi dell'utente nei sandali utilizzare i cinghietti in velcro in dotazione.



9.13 Fissare le cavigliere

Far scorrere la cinghia nella fessura del sandalo. Formare un cappio facendo passare la cinghia attraverso la fibbia prima dal basso verso l'alto e poi nuovamente verso il basso. Per assicurare la cinghia bisogna farla passare nuovamente attraverso la fibbia. Accorciare la cinghia secondo le proprie esigenze.



9.14 Supporti per il contenimento degli arti superiori

Per regolare l'altezza del supporto delle spalle svitare i bulloni, muovere le staffe del supporto nella posizione desiderata ed avvitare i bulloni.

9.15 Supporto per il capo

Per regolare l'altezza e la profondità del supporto per il capo della misura 1 e 2 svitare la manopola (A) ed una volta messo il supporto in posizione avvitare la manopola. Effettuare lo stesso procedimento per la misura 3 aprendo la leva al posto della manopola (B). Non rimuovere il supporto per il capo quando l'utente è seduto nell'ausilio.



Non utilizzare mai il supporto della testa per correggere la posizione della testa dell'utente.




Fare sempre attenzione a non ferirsi le dita durante l'operazione di regolazione del supporto della testa.

A



B

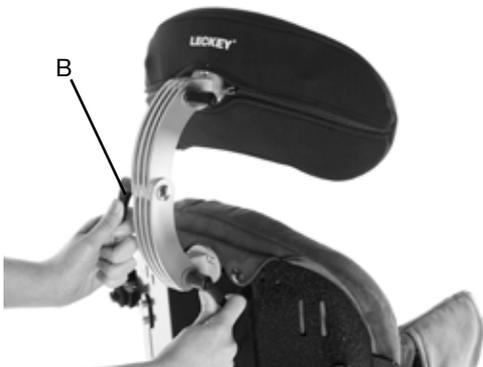

9.16 Regolazione dei braccioli

Per regolare l'altezza del bracciolo svitare la manopola (A), posizionarlo all'altezza desiderata ed avvitare la manopola. Per regolare l'angolazione ruotare la leva (B) fino a raggiungere l'angolazione desiderata.



9.17 Regolazione del tavolino

L'altezza e l'inclinazione del tavolino si possono modificare mediante la regolazione dei braccioli come spiegato nella sezione 9.16. Per rimuovere o regolare la profondità del tavolino svitare la manopola (A) situata sotto il bracciolo, posizionare il tavolino ed avvitare la manopola.



Prestare sempre attenzione affinché le mani e le braccia dei bambini non rimangano intrappolate quando si inserisce il tavolino.




Non utilizzare mai il tavolino per trascinare o spingere l'ausilio.



Non posizionare oggetti con temperatura superiore ai 40° sul tavolino.



L'uso del tavolino è riservato esclusivamente all'utente. Non attaccare o posizionare sul tavolino oggetti con un peso superiore agli 8 kg.

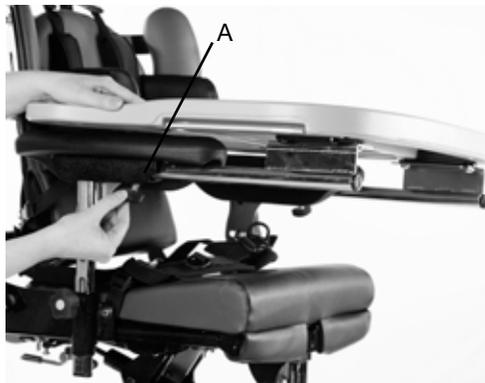

Regolazioni frequenti per un uso quotidiano (terapisti/assistenti/genitori)

Ai genitori ed agli assistenti dovrebbe essere mostrato come effettuare regolazioni frequenti e dovrebbero essere portati a conoscenza dei controlli di sicurezza presenti nella sezione 6 da una persona tecnicamente e clinicamente preparata, addestrata ad usare il prodotto. Leckey consiglia di conservare una documentazione scritta di tutti coloro, genitori e assistenti, che sono stati addestrati nell'uso di questo prodotto.

10

10.1 Trasferire il bambino nel e dall'ausilio

Prima di trasferire il bambino nell'ausilio, effettuare ispezioni quotidiane del prodotto come schematizzato nella sezione 12 del seguente manuale.

Posizionare il sedile ad un'altezza che possa facilitare il trasferimento. Bloccare le rotelle assicurandosi che siano rivolte verso l'esterno per migliorare la stabilità del prodotto. Assicurarsi che la fibbia posizionata sullo stabilizzatore pettorale (se presente) sia sganciata e messa da parte per facilitare il trasferimento.

Se l'ausilio è munito di supporti laterali per il tronco swing away, per prima cosa bisogna che questi vengano sganciati. Sganciare la cinghia pelvica al centro e per ultima cosa, se i sandali sono indossati, aprire le cinghie. Siete ora pronti per trasferire o sollevare il bambino dall'ausilio.

Una volta che il bambino è alloggiato nell'ausilio la prima cosa da fare è quella di allacciare la cinghia pelvica mediante la fibbia centrale. Successivamente agganciare le cinghie dei sandali e qualsiasi altra cintura e riposizionare i supporti laterali del petto.



Agganciare sempre la cinghia pelvica prima di agganciare qualsiasi altra fibbia o cintura. Regolare la cintura in modo tale che il bambino non possa scivolare o strisciare in avanti nell'ausilio.

10.2 Regolare la cinghia pelvica

Per regolazioni laterali aprire le fibbie, tirare le cinghie per stringere o rilasciare la fibbia per allentare a seconda della vestibilità necessaria (A). Per regolare il centro della cintura tirare l'anello a D situato sul velcro ed allentare ciascuna cinghia attraverso la fibbia per allentare la cintura. Per stringere la cintura tirare l'anello a D lontano dalla cinghia (B).



Assicurarsi che la cinghia sia assicurata alla fibbia ad occhiello nel caso in cui la fibbia dovesse aprirsi accidentalmente.



10.3 Regolazione della cintura pettorale e della cintura di bloccaggio del tronco

Se il bambino necessita di supporti del petto come parte integrante del proprio programma posturale l'ausilio sarà munito di supporti laterali rigidi o di una combinazione di supporti laterali, cintura pettorale e cintura di bloccaggio del tronco. Questo potrebbe comportare una regolazione quotidiana dei componenti per essere accomodati ai diversi tipi di abbigliamento.

Controllare sempre con l'ausilio del terapeuta il posizionamento e la tensione delle cinghie e gli accessori di supporto del bambino.

Per modificare la profondità della cintura pettorale sollevare il rivestimento frontale, regolare le cinghie di Velcro e riposizionare il rivestimento.

Fare riferimento alla sezione 9.11 per indicazioni specifiche su come regolare la cintura di bloccaggio del tronco. Quando si utilizza la cintura pettorale assicurarsi sempre che le fibbie in plastica siano completamente allacciate.



Controllare che la cintura ed i supporti laterali siano ben assicurati per essere sicuri che il bambino non possa slittare in avanti rischiando di soffocare.



Se il bambino è attivo o ha degli spasmi in estensione assicurarsi a seguito di ogni spasmo che la cinghia pelvica sia ben agganciata, che il bambino sia in sicurezza e che non possa scivolare in avanti nell'ausilio.



Agganciare sempre il centro della cinghia pelvica prima di effettuare qualsiasi altra regolazione.



10.4 Telaio

Il dispositivo Everyday Activity Seat è disegnato per essere adattato a diverse opzioni di telaio. La misura 1 si adatta al telaio base ed al telaio hi-low con molla a gas, la misura 2 si adatta al telaio base, al telaio con molla a gas ed al telaio con dispositivo elettrico, mentre la misura 3 si adatta al telaio base ed al telaio hi-low con molla idraulica. Questo manuale mostra l'uso sicuro e corretto del sistema di seduta con tutte queste opzioni di telaio. Le rotelle montate sui telai sono comprese di blocco direzionale. Per bloccarle premere in basso il pedale grigio. Quando le rotelle direzionali sono in uso l'ausilio è guidata dalle rotelle posteriori.

10.5 Regolazione dell'altezza – Telaio hi-low

Questo tipo di regolazione può essere effettuata quando l'utente è alloggiato nell'ausilio. Per regolare l'altezza del telaio hi-low premere la leva a pedale nella parte posteriore dello stesso mentre si tiene premuto il maniglione. Una volta rilasciata la leva a pedale l'ausilio si bloccherà all'altezza prescelta. Per sicurezza le leva a pedale può essere bloccata mediante il perno di bloccaggio (A) situato sul lato destro del pedale. Per sbloccare la leva a pedale estrarre il perno e ruotarlo di 90°. Il perno di bloccaggio (A) dovrebbe essere sempre chiuso quando non si sta regolando il telaio.

Estrarre il pedale dall'ausilio prima di utilizzare la leva a pedale.



Tenere sempre inserito il perno di bloccaggio quando non si sta regolando il telaio. Ciò è necessario per evitare che la leva a pedale sia azionata accidentalmente.



10.6 Regolazione dell'altezza- Telaio base



Per i bambini con un peso superiore a 27kg (60lb) sono necessarie due persone per sollevare il telaio Hi-low (regolamentazione dell' UK per il sollevamento e la movimentazione).



Per evitare di ferirsi le dita prestare attenzione quando la base viene regolata in altezza.



La regolazione dell'altezza del telaio base dovrebbe essere effettuata prima di alloggiarvi il bambino. Per regolare l'altezza bisogna aprire la leva (a) situata nella parte posteriore del tronco principale. Per abbassare l'altezza dell'ausilio, praticare pressione sulla base dell'ausilio sopra il tronco centrale. Stringere la leva per bloccare l'ausilio all'altezza stabilita.



Controllare con frequenza la leva per assicurarsi che la regolazione dell'altezza dell'ausilio funzioni.



Non regolare l'altezza quando il bambino è alloggiato nell'ausilio.

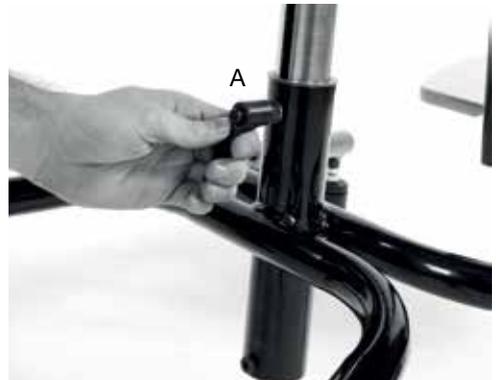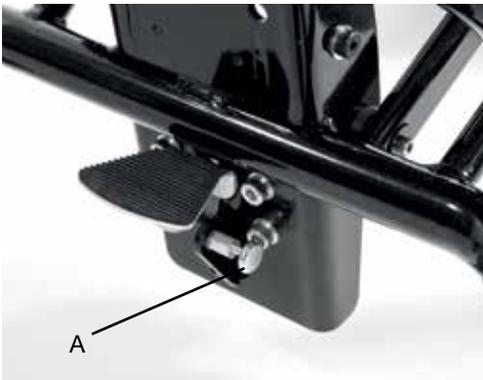

10.7 Regolazione dell'altezza- Telaio a pistone idraulico Hi-Low

Questo tipo di regolazione può essere effettuata quando l'utente è alloggiato nell'ausilio. Per regolare l'altezza del telaio hi-low attivare la pompa della leva a pedale che si trova nella parte posteriore del telaio mentre si tiene premuto il maniglione. Una volta che si toglie il piede dal pedale l'ausilio si bloccherà nella posizione desiderata

Estrarre il pedale dall'ausilio prima di utilizzare la leva a pedale.



10.8 Regolazione dell'altezza- Telaio Hi-Low con motore elettrico

Questo tipo di regolazione può essere effettuata quando l'utente è alloggiato nell'ausilio. Premere sul telecomando il tasto della freccia che va in alto o il tasto della freccia che va in basso a seconda dell'altezza che si vuole ottenere. Una volta rilasciato il bottone l'ausilio si bloccherà automaticamente.



10.9 Basculazione

La basculazione può essere attivata mentre l'utente è alloggiato nell'ausilio. Prima di regolare l'angolazione della basculazione assicurarsi sempre che la cinghia pelvica sia ben allacciata per evitare che l'utente scivoli in avanti.

Per regolare l'angolazione della basculazione premere la leva situata sotto la base dell'ausilio. Una volta selezionato l'angolo desiderato rilasciare la leva per bloccare l'ausilio. La basculazione dovrebbe essere bloccata mentre l'utente è nell'ausilio. Per bloccare la leva ruotare il perno di arresto a destra della leva ed il perno si bloccherà. Potrebbe essere necessario alzare leggermente la leva per permettere al perno di bloccarsi.

Per sbloccare, premere il perno e ruotarlo di 90° ed utilizzare la leva.



Mantenere sempre la leva della basculazione bloccata per evitare attivazioni accidentali della stessa che potrebbe far sobbalzare l'ausilio e provocare lesioni al bambino.



Utilizzare il maniglione quando si effettua la basculazione.



Controllare sempre con l'ausilio del terapeuta che l'utilizzo della basculazione non causi ostruzioni delle vie respiratorie del bambino.



Reggere sempre saldamente con una mano il maniglione quando si apre la leva.



10.10 Sandali

Per posizionare i piedi dell'utente nei sandali assicurarli con le cinghie per mantenere in posizione il piede. Le cinghie devono essere posizionate sul dorso del piede e sopra le dita dei piedi.



Se il bambino indossa sandali o calzature leggere posizionare le cinghie in modo tale da evitare che la fibbia possa irritare la pelle.



10.11 Regolazione del tavolino

Il tavolino può essere utilizzato per una vasta gamma di attività e la sua posizione regolata per accogliere al meglio l'utente nei momenti di svago, educativi e durante i pasti.

Per fissare il tavolino grigio, chiaro o nero, inserire le barre nelle guide situate al centro dei braccioli. Per fissare il tavolino in legno inserire la singola barra nella guida situata sotto il bracciolo destro o sinistro a seconda della posizione che si vuole adottare. Una volta che il tavolino (chiaro, nero, grigio o in legno) si trova in posizione (a) stringere la manopola per fissare il tutto.

Per modificare l'altezza e l'angolazione del tavolino regolare i braccioli.



Per evitare di ferirsi le dita prestare attenzione quando si regola l'altezza.



Prestare sempre attenzione che le mani e le braccia dei bambini non rimangano intrappolate quando si inserisce il tavolino.



Non utilizzare mai il tavolino per trascinare o spingere l'ausilio.



Quando l'utente è alloggiato nell'ausilio mantenere il telaio del tavolino quando questo viene rimosso dalla guida e continuare fino a quando non è totalmente fuori dall'ausilio e dalla portata dell'utente.

10.12 Regolazione del bracciolo




Non posizionare oggetti con temperatura superiore ai 40° sul tavolino.



L'uso del tavolino è riservato esclusivamente all'utente. Non attaccare o posizionare sul tavolino oggetti con un peso superiore agli 8 kg.

Per regolare l'altezza del bracciolo svitare la manopola (A), posizionare all'altezza desiderata ed avvitare la manopola. Per regolare l'angolazione ruotare la leva (B) fino al raggiungimento dell'angolazione desiderata.

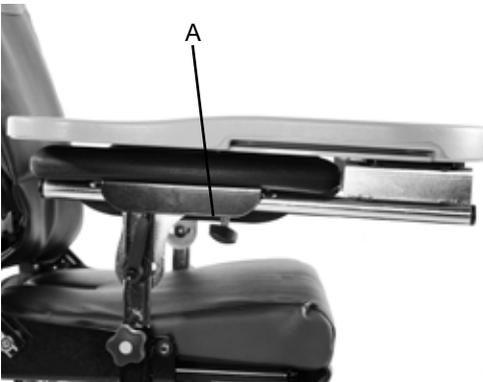

10.13 Spingere in alto la pedana poggiapiedi

Per alzare la pedana poggiapiedi spingerla in alto dalla parte frontale (a), quando questa sarà totalmente alzata il perno d'arresto si bloccherà automaticamente. Per abbassare la pedana tirare il perno d'arresto (b) e spingere la pedana in basso. È possibile mantenere la pedana poggiapiedi sbloccata ruotando il perno d'arresto una volta tirato.



11 Informazioni sulla Pulizia e sulla Manutenzione

Come Effettuare la Manutenzione

Per pulire si consiglia di utilizzare solo acqua calda e detergenti non abrasivi. Non utilizzare in nessun caso solventi organici o liquidi per la pulizia a secco.

Imbottiture e tessuti

1. I rivestimenti dei cuscini in tessuto morbido possono essere rimossi e lavati in lavatrice a 40° ma non possono essere asciugati nell'asciugatrice. Rimuovere la gommapiuma dai seguenti rivestimenti prima di lavarli:

Poggiatesta

Cuscino dello schienale

Cuscino della seduta

Tutte le imbottiture soffici possono essere lavate in lavatrice dopo aver rimosso tutti i bulloni e tutte le chiusure.

Tutti i rivestimenti dei cuscini in vinile possono essere puliti con un panno ed acqua.

2. Le imbottiture e i tessuti possono essere anche puliti a mano quando si trovano al proprio posto. Quando si pulisce il prodotto, si consiglia di utilizzare solo acqua calda e detergenti non abrasivi.

3. È consigliato rimuovere le macchie il prima possibile con un panno assorbente, un asciugamano o una spugna. La pulizia ordinaria con una spugna impregnata di acqua e sapone è efficace per sporco e perdite di scarsa intensità. Fare attenzione a non bagnare eccessivamente il tessuto, altrimenti lo sporco si spargerà ulteriormente.

4. I detergenti antisettici possono essere usati sulle macchie più ostinate. Per queste potrebbe essere utile un solvente sicuro come l'alcol isopropilico o l'olio minerale. Anche mezza tazza di candeggina per 5 litri d'acqua può essere utilizzata come disinfettante efficace.

5. La cinghia pelvica e la cintura di bloccaggio del tronco possono essere lavate in lavatrice a 40°. Assicurarsi che tutti i bulloni e le chiusure siano state rimosse prima del lavaggio perché potrebbero danneggiare la lavatrice. Conservare le parti asportate in un posto sicuro e lontano dalla portata dei bambini.

6. Assicurarsi sempre che il prodotto sia asciutto prima dell'uso.

Componenti Metallici ed in Plastica

1. Acqua e sapone o uno spray antibatterico possono essere utilizzati per la pulizia quotidiana.

2. Per una pulizia profonda è possibile utilizzare un'idropulitrice.

3. Non utilizzare solventi per pulire i componenti in plastica o in metallo.

4. Assicurarsi che il prodotto sia perfettamente asciutto prima dell'uso.

12 Controllo quotidiano del prodotto

(Terapisti, Genitori e Assistenti)

Si consiglia a terapisti, genitori o assistenti di effettuare quotidiani controlli visivi dell'apparecchiatura, per assicurarsi dell'uso sicuro del prodotto. I controlli quotidiani consigliati sono elencati sotto.

1. Controllare che tutte le manopole ed i bulloni siano al proprio posto e ben stretti.
2. Verificare che non ci siano segni d'usura nelle imbottiture e sul velcro.
3. Controllare che le rotelle non siano incastrate e che si blocchino in sicurezza.
4. Controllare che i sistemi di bloccaggio dell'ausilio siano funzionanti e che l'ausilio sia completamente fissata sul telaio.
5. Controllare che la cinghia pelvica sia ben assicurata intorno all'utente e che questo non possa scivolare o slittare in avanti nell'ausilio.
6. Controllare che la pedana poggiapiedi sia fissata bene.



In caso di dubbi relativo sulla persistenza dell'uso sicuro del vostro prodotto Leckey o nel caso in cui alcune parti dovessero rompersi, si prega di interrompere l'uso del prodotto e contattare il nostro customer service o il vostro rivenditore locale il prima possibile.

13 Controllo annuale del prodotto

(Terapista, Tecnico, Product Advisor Leckey, Rivenditore)

Leckey raccomanda il controllo dettagliato del prodotto almeno una volta all'anno e ogni volta che il prodotto viene riassegnato. Tale controllo dovrebbe essere effettuato da personale tecnico competente, formato sull'uso del prodotto, e dovrebbe comprendere i seguenti punti come requisito minimo.

1. Controllare che tutte le impugnature, manopole, dadi, viti e fibbie in plastica siano al proprio posto, rimpiazzando gli elementi mancanti.

Prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

- > Bulloni di bloccaggio del poggiatesta.
- > Bulloni di regolazione della profondità della seduta
- > Bulloni di fissaggio della cinghia pelvica/guida del bacino.
- > Regolazione dell'altezza e dell'angolazione della pedana poggipiedi.

2. Controllare che i meccanismi di regolazione dell'altezza del telaio funzionino appropriatamente. Se il telaio ha la leva a pedale assicurarsi che l'altezza del sedile non subisca modifiche quando il pedale viene rilasciato. Controllare inoltre che il perno di bloccaggio si blocchi per evitare regolazioni accidentali del telaio.

3. Basculare la sedia nella sua massima angolazione e controllare che tutte le leve di bloccaggio funzionino nelle varie posizioni.

4. Controllare che nei punti in cui telaio e seggiolone sono unite non ci siano segni di usura sui componenti metallici.

5. Sollevare la base per controllare le rotelle singolarmente. Assicurarsi che si muovano liberamente e rimuovere lo sporco. Assicurarsi che i freni, quando azionati, blocchino le rotelle.

6. Controllare la struttura del prodotto prestando attenzione ai punti della struttura saldati assicurandosi che non ci siano lesioni o quant'altro intorno alle saldature.

7. Leckey consiglia di conservare documentazione scritta relativa a tutti i controlli annuali effettuati sul prodotto. In caso di dubbi relativi sulla persistenza dell'uso sicuro del vostro prodotto Leckey o nel caso in cui alcune parti dovessero rompersi, si prega di interrompere l'uso del prodotto e contattare il nostro customer service o il vostro rivenditore locale il prima possibile.

13.1 Etichetta di identificazione

L'etichetta di identificazione è allegata al prodotto e al manuale dell'utente. Quando si ordinano pezzi di ricambio o si fa richiesta, sono richieste le seguenti informazioni:

- Numero di serie
- Data di produzione



 Nome del prodotto/codice articolo

 Portata massima

 Marchio CE

 Guida per l'utente

 Data di produzione

 Numero di serie

14 Distribuzione dei prodotti Leckey

Molti dei prodotti sono valutati e ordinati per soddisfare i bisogni di un singolo utente. Prima di rimettere in circolazione un prodotto si raccomanda al terapeuta prescrivente di verificare la compatibilità delle attrezzature per il nuovo utente e che la rimessa in funzione del prodotto non presenti modifiche o attacchi speciali.

Prima della rimessa in funzione, occorre effettuare un controllo tecnico approfondito da parte di personale tecnico competente. Per l'esecuzione dei controlli richiesti, consultare la Sezione 13.

Assicurarsi che il prodotto sia stato pulito in modo approfondito secondo quanto stabilito dalla sezione 11 del presente manuale.

Assicurarsi che una copia del manuale dell'utente sia fornito con il prodotto.

È possibile scaricare il manuale dal sito www.SunriseMedical.it.

Sunrise Medical raccomanda di tenere traccia dei controlli e delle ispezioni effettuati sul prodotto.



In caso di dubbi sull'uso continuato in sicurezza del prodotto o qualora dovesse danneggiarsi una parte, interrompere l'utilizzo del prodotto e contattare immediatamente il servizio clienti o il rivenditore di zona.

15 Assistenza tecnica del prodotto

L'assistenza tecnica di tutti prodotti
Leckey dovrebbe essere effettuata solo
da personale tecnico competente istruito
sull'utilizzo del prodotto.

Per qualunque informazione potete
contattare il Servizio Clienti di Sunrise
Medical telefonando al numero 0523 573111
o inviando un'e-mail all'indirizzo [info@
sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it). Potete consultare anche il
sito web www.SunriseMedical.it.



**Per tutte le altre richieste, è possibile
rivolgersi al rivenditore Sunrise Medical
più vicino.**

Distributore per l'Italia

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it
info@sunrisemedical.it

16 Informazioni Tecniche

Misura	1	2	3
	mm/kg	mm/kg	mm/kg
Portata Massima	30kgs	50kg	100kgs
Peso sedia e telaio base	22.5kg	27kg	35.9kg
Peso sedia e telaio hi-low	29.5kg	34kg	49kg
Altezza sedia- telaio base	450-600	450-600	450-600
Altezza sedia-telaio hi-low	250-600	320-600	450-600
Ampiezza sedile	160-280	260-380	340-500
Profondità sedile	150-280	230-380	330-480
Distanza supporti pettorali	150-220	170-240	240-370
Altezza schienale	300-400	400-520	450-630
Angolo posteriore	30° supino 10° prono	30° supino 10° prono	30° supino 10° prono
Altezza bracciolo	150-250	200-300	180-325
Lunghezza parte inferiore della gamba	150-250	250-450	250-450
Angolo della parte inferiore della gamba	-10° a +50°	-10° a +50°	-10° a +50°
Angolo della pedana poggipièdi	-15° a +10°	-15° a +10°	-15° a +10°
Basculazione	30° supino 10° prono	30° supino 10° prono	30° supino 10° prono

Tutte le richieste di assistenza internazionali dovrebbero essere rivolte all'apposito distributore Leckey che sarà lieto di aiutarvi. Per ulteriori informazioni sui distributori Leckey visitate il nostro sito.

Accessori

TELAIO

151-6100	1°Misura sedia base, poggiatesta, telaio base con pistone a gas e rotelle da 100mm – Nero
151-6200	2°Misura sedia base, poggiatesta, telaio base con pistone a gas e rotelle da 100mm- Nero
151-6300	3°Misura sedia base, poggiatesta, telaio base con pistone a gas e rotelle da 100mm – Nero
151-6101	1°Misura sedia base, poggiatesta, telaio base con pistone a gas e rotelle da 100mm – Bianco
151-6201	2°Misura sedia base, poggiatesta, telaio base con pistone a gas e rotelle da 100mm – Bianco
151-6301	3°Misura sedia base, poggiatesta, telaio base con pistone a gas e rotelle da 100mm – Bianco
151-6102	1°Misura sedia base, poggiatesta, sistema hi-low con pistone a gas e rotelle da 100mm- Nero
151-6202	2°Misura sedia base, poggiatesta, sistema hi-low con pistone a gas e rotelle da 100mm- Nero
151-6103	1°Misura sedia base, poggiatesta, sistema hi-low con pistone a gas e rotelle da 100mm- Bianco
151-6203	1°Misura sedia base, poggiatesta, sistema hi-low con pistone a gas e rotelle da 100mm- Bianco
151-6204	2°Misura sedia base, poggiatesta e telaio hi-low con motore elettrico e rotelle da 100mm - Nero
151-6205	2°Misura sedia base, poggiatesta e telaio hi-low con motore elettrico e rotelle da 100mm - Nero
151-6302	3°Misura sedia base, poggiatesta d telaio a pistone idraulico con rotelle di 125mm-Nero
151-6303	3°Misura sedia base, poggiatesta e telaio a pistone idraulico con rotelle di 125mm-Bianco

KIT DI RIVESTIMENTI

151-6104-01	1°Misura cuscini e rivestimenti –Verde (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
151-6104-03	1°Misura cuscini e rivestimenti –Blu (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
151-6104-04	1°Misura cuscini e rivestimenti –Lampone (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
151-6104-05	1°Misura cuscini e rivestimenti –Ebano Grigio (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
151-6104-01VIN	1°Misura cuscini e rivestimenti - Verde (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
151-6104-03VIN	1°Misura cuscini e rivestimenti - Blu (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)

- 151-6104-04VIN 1°Misura cuscini e rivestimenti - Lampone (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6104-07VIN 1°Misura cuscini e rivestimenti - Nero (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-01 2°Misura cuscini e rivestimenti - Verde (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-03 2°Misura cuscini e rivestimenti - Blu (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-04 2°Misura cuscini e rivestimenti - Lampone (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-05 2°Misura cuscini e rivestimenti - Ebano Grigio (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-01VIN 2°Misura cuscini e rivestimenti - Verde (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-03VIN 2°Misura cuscini e rivestimenti - Blu (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-04VIN 2°Misura cuscini e rivestimenti - Lampone (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-07VIN 2°Misura cuscini e rivestimenti - Nero (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-01 3°Misura cuscini e rivestimenti - Verde (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-03 3°Misura cuscini e rivestimenti - Blu (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-04 3°Misura cuscini e rivestimenti - Lampone (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-05 3°Misura cuscini e rivestimenti - Ebano grigio (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-01VIN 3°Misura cuscini e rivestimenti - Verde (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-03VIN 3°Misura cuscini e rivestimenti - Blu (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-04VIN 3°Misura cuscini e rivestimenti - Lampone (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-07VIN 3°Misura cuscini e rivestimenti - Nero (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)

ACCESSORI PER IL SUPPORTO DELLA TESTA

- 151-3751-05 S3 Poggiatesta Sagomato - (neoprene nero)
- 151-6208-05 1/2 Misura componenti del poggiatesta piatto e rivestimenti - Ebano Grigio (disponibile solo con i kit di rivestimento 01,03 e 04)
- 151-6208-06 1/2 Misura componenti del poggiatesta piatto e rivestimenti -Tortora (disponibile solo con i kit di rivestimento 05)
- 151-6208-05VIN 1/2 Misura componenti del poggiatesta piatto e rivestimenti -Ebano Grigio (disponibile solo con i kit di rivestimento 01VIN, 07VIN e 04VIN)
- 151-6208-07VIN 1/2 Misura componenti del poggiatesta piatto e rivestimenti -Nero (disponibile solo con i kit di rivestimento 03VIN)
- 151-6209-05 Poggiatesta piatto con supporti laterali e rivestimenti -Ebano Grigio (disponibile solo con i kit di rivestimento 01,03,04)
- 151-6209-06 Poggiatesta piatto con supporti laterali e rivestimenti -Tortora (disponibile solo con i kit di rivestimento 05)
- 151-6209-05VIN Poggiatesta piatto con supporti laterali e rivestimenti -Ebano Grigio (disponibile solo con i kit di rivestimento 01VIN,07VIN,04VIN)
- 151-6209-07VIN Poggiatesta piatto con supporti laterali e rivestimenti -Nero

151-1756 (disponibile solo con i kit di rivestimento 03VIN)
staffa di fissaggio del poggiatesta Mygo

ACCESSORI PER IL SUPPORTO DEL PETTO

- 151-6106-01 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)-
Nero metallizzato
- 151-6106-03 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero
metallizzato
- 151-6106-04 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Lampone)-
Nero metallizzato
- 151-6106-05 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Ebano Grigio)-Nero
metallizzato

- 151-6106-01VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Nero metallizzato
- 151-6106-03VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero
metallizzato
- 151-6106-04VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Lampone)
-Nero metallizzato
- 151-6106-07VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Nero)-Nero
metallizzato

- 151-6107-01 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Bianco metallizzato
- 151-6107-03 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco
metallizzato
- 151-6107-04 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Lampone)-
Bianco metallizzato
- 151-6107-05 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Ebano Grigio)
-Bianco metallizzato

- 151-6107-01VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Bianco metallizzato
- 151-6107-03VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco
metallizzato
- 151-6107-04VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Lampone)
-Bianco metallizzato
- 151-6107-07VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Nero)-Bianco
metallizzato

- 151-6210-01 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Nero metallizzato
- 151-6210-03 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Nero metallizzato
- 151-6210-04 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6210-05 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Ebano
Grigio)-Nero metallizzato

- 151-6210-01VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Nero metallizzato
- 151-6210-03VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Nero metallizzato
- 151-6210-04VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Nero metallizzato

- 151-6210-07VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Nero)
-Nero metallizzato
- 151-6211-01 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Bianco metallizzato
- 151-6211-03 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Bianco metallizzato
- 151-6211-04 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone) -Bianco metallizzato
- 151-6211-05 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Ebano
Grigio)-Bianco metallizzato
- 151-6211-01VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Bianco metallizzato
- 151-6211-03VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Bianco metallizzato
- 151-6211-04VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6211-07VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Nero)
-Bianco metallizzato
- 151-6306-01 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Nero metallizzato
- 151-6306-03 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Nero metallizzato
- 151-6306-04 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6306-05 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Ebano
Grigio)-Nero metallizzato
- 151-6306-01VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Nero metallizzato
- 151-6306-03VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Nero metallizzato
- 151-6306-04VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone) -Nero metallizzato
- 151-6306-07VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Nero)
-Nero metallizzato
- 151-6307-01 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Bianco metallizzato
- 151-6307-03 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Bianco metallizzato
- 151-6307-04 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6307-05 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Ebano
Grigio)-Bianco metallizzato
- 151-6307-01VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Bianco metallizzato
- 151-6307-03VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Bianco metallizzato
- 151-6307-04VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6307-07VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Nero)

-Bianco metallizzato

- 151-6108-01 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Nero metallizzato
- 151-6108-03 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero metallizzato
- 151-6108-04 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6108-05 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Ebano Grigio)-Nero metallizzato

- 151-6108-01VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Nero metallizzato
- 151-6108-03VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero metallizzato
- 151-6108-04VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6108-07VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Nero)-Nero metallizzato

- 151-6109-01 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6109-03 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6109-04 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6109-05 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Ebano Grigio)-Bianco metallizzato

- 151-6109-01VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6109-03VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6109-04VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6109-07VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Nero)-Bianco metallizzato

- 151-6212-01 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Nero metallizzato
- 151-6212-03 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero metallizzato
- 151-6212-04 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6212-05 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Ebano Grigio)-Nero metallizzato

- 151-6212-01VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Nero metallizzato
- 151-6212-03VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero metallizzato
- 151-6212-04VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6212-07VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Nero)-Nero metallizzato

- 151-6213-01 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6213-03 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6213-04 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6213-05 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Ebano Grigio)-Bianco metallizzato

- 151-6213-01VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6213-03VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6213-04VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6213-07VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Nero)-Bianco metallizzato

- 151-6308-01 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Nero metallizzato
- 151-6308-03 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero metallizzato
- 151-6308-04 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6308-05 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Ebano Grigio)-Nero metallizzato

- 151-6308-01VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Nero metallizzato
- 151-6308-03VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero metallizzato
- 151-6308-04VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6308-07VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Nero)-Nero metallizzato

- 151-6309-01 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6309-03 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6309-04 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6309-05 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Ebano Grigio)-Bianco metallizzato

- 151-6309-01VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6309-03VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6309-04VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6309-07VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Nero)-Bianco metallizzato

- 151-6214-01 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Verde incluso)
151-6214-03 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Blu incluso)
151-6214-04 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Lampone incluso)
151-6214-05 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Ebano Grigio incluso)
- 151-6214-01VIN 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Verde incluso)
151-6214-03VIN 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Blu incluso)
151-6214-04VIN 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Lampone incluso)
151-6214-07VIN 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Nero incluso)
- 133-625 S3 Cintura pettorale (neoprene nero)
- 151-1757 1°Misura Coppia di supporti laterali flessibili a struttura complessa - Nero metallizzato
151-2757 2°Misura Coppia di supporti laterali flessibili a struttura complessa - Nero metallizzato
151-3757 3°Misura Coppia di supporti laterali flessibili a struttura complessa - Nero metallizzato
- 151-6110 1°Misura Coppia di supporti laterali flessibili a struttura complessa - Bianco metallizzato
151-6215 2°Misura Coppia di supporti laterali flessibili a struttura complessa - Bianco metallizzato
151-6311 3°Misura Coppia di supporti laterali flessibili a struttura complessa - Bianco metallizzato
- 151-6111-01 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
151-6111-03 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Nero metallizzato
151-6111-04 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Nero metallizzato
151-6111-05 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero metallizzato
- 151-6111-01VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
151-6111-03VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Nero metallizzato
151-6111-04VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Nero metallizzato
151-6111-07VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Nero incluso)-Nero metallizzato
- 151-6112-01 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato
151-6112-03 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Bianco metallizzato
151-6112-04 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco metallizzato
151-6112-05 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6112-01VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde

- 151-6112-03VIN incluso)-Bianco metallizzato
1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6112-04VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6112-07VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Nero incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6216-01 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-03 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-04 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-05 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-01VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-03VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-04VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-07VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Nero incluso)-Nero metallizzato
- 151-6217-01 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-03 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-04 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-05 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-01VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-03VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-04VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-07VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Nero incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6312-01 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-03 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-04 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-05 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-01VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato

- 151-6312-03VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-04VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-07VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Nero incluso)-Nero metallizzato
- 151-6313-01 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-03 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-04 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-05 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-01VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-03VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-04VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-07VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Nero incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6218-05 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6218-06 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Tortora incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6218-05VIN 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6218-07VIN 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6219-05 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6219-06 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Grigio Tortora incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6219-05VIN 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6219-07VIN 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Nero incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6314-05 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6314-06 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Grigio Tortora incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6314-05VIN 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6314-07VIN 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato

- 151-6315-05 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6315-06 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Grigio Tortora incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6315-05VIN 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6315-07VIN 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Nero incluso)-Bianco metallizzato
- 151-1754 1° Misura imbottiture laterali (Coppia di soli componenti) -Nero Metallizzato
- 151-2754 2° Misura imbottiture laterali (Coppia di soli componenti) -Nero Metallizzato
- 151-3754 3° Misura imbottiture laterali (Coppia di soli componenti) -Nero Metallizzato
- 151-6113 1° Misura imbottiture laterali (Coppia di soli componenti) -Bianco metallizzato
- 151-6220 2° Misura imbottiture laterali (Coppia di soli componenti) -Bianco metallizzato
- 151-6316 3° Misura imbottiture laterali (Coppia di soli componenti) -Bianco metallizzato
- 151-6114-01 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Verde)
- 151-6114-03 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Blu)
- 151-6114-04 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Lampone)
- 151-6114-05 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Ebano Grigio)
- 151-6114-01VIN 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Verde)
- 151-6114-03VIN 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Blu)
- 151-6114-04VIN 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Lampone)
- 151-6114-07VIN 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Nero)
- 151-6221-01 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Verde)
- 151-6221-03 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Blu)
- 151-6221-04 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Lampone)
- 151-6221-05 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Ebano Grigio)
- 151-6221-01VIN 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Verde)
- 151-6221-03VIN 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Blu)
- 151-6221-04VIN 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Lampone)
- 151-6221-07VIN 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Nero)
- 151-6316-01 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Verde)
- 151-6316-03 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Blu)
- 151-6316-04 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Lampone)
- 151-6316-05 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Ebano Grigio)
- 151-6316-01VIN 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Verde)
- 151-6316-03VIN 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Blu)
- 151-6316-04VIN 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Lampone)
- 151-6316-07VIN 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Nero)
- 151-6115-01 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Nero

151-6115-03	Metallizzato 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
151-6115-04	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
151-6115-05	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
151-6115-01VIN	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
151-6115-03VIN	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
151-6115-04VIN	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
151-6115-07VIN	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
151-6116-01	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
151-6116-03	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
151-6116-04	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
151-6116-05	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco Metallizzato
151-6116-01VIN	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
151-6116-03VIN	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
151-6116-04VIN	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
151-6116-07VIN	1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Nero incluso)-Bianco Metallizzato
151-6222-01	2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
151-6222-03	2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
151-6222-04	2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
151-6222-05	2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
151-6222-01VIN	2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
151-6222-03VIN	2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
151-6222-04VIN	2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
151-6222-07VIN	2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
151-6223-01	2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato

- 151-6223-03 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-04 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-05 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-01VIN 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-03VIN 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-04VIN 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-07VIN 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Nero incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6317-01 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-03 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-04 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-05 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-01VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-03VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-04VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-07VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6318-01 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-03 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-04 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-05 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-01VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-03VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-04VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-07VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Nero incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6224-01 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
- 151-6224-03 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Nero

- 151-6224-04 Metallizzato
2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6224-05 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6224-01VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6224-03VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6224-04VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6224-07VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6225-01 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6225-03 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6225-04 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6225-05 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6225-01VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6225-03VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6225-04VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6225-07VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Nero incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6320-01 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-03 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-04 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-05 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-01VIN 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-03VIN 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-04VIN 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-07VIN 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6321-01 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6321-03 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato

151-6321-04	3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
151-6321-05	3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco Metallizzato
151-6321-01VIN	3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
151-6321-03VIN	3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
151-6321-04VIN	3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
151-6321-07VIN	3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Nero incluso)-Bianco Metallizzato
155-H001-L600	Cintura ad H misura Small e kit di cinghie (Leckey)
155-H001-L601	Cintura ad H misura Medium e kit di cinghie (Leckey)
155-H001-L602	Cintura ad H misura Large e kit di cinghie (Leckey)
155-H001-L603	Cintura ad H misura XLarge e kit di cinghie (Leckey)
155-N001-L600	Cintura Aderente Small e kit di cinghie (Leckey)
155-N001-L601	Cintura Aderente Medium e kit di cinghie (Leckey)
155-N001-L602	Cintura Aderente Large e kit di cinghie (Leckey)
155-N001-L603	Cintura Aderente XLarge e kit di cinghie (Leckey)
155-N001-L604	Cintura Aderente Xxlarge e kit di cinghie (Leckey)
120-799	Cintura di bloccaggio del tronco Small (Mygo)
120-757	Cintura di bloccaggio del tronco Medium (Mygo)
117-761	Cintura di bloccaggio del tronco Large (Mygo)
117-750	Prolunghe per cinghie (10cm)
151-6122	S1 Tavolino in legno mobile
151-6231	S2 Tavolino in legno mobile
151-6326	S3 Tavolino in legno mobile
151-1644	S1 Tavolino in plastica
151-2644	S2 Tavolino in plastica
133-2148	Assemblaggio del tavolino (bracciolo estendibile chiaro)
133-2149	Assemblaggio del tavolino (tavolino estendibile nero)
151-3766	Assemblaggio del tavolino chiaro (20mm aggiuntivi di profondità del sedile)
151-3767	Assemblaggio del tavolino nero (20mm aggiuntivi di profondità del sedile)

ACCESSORI PER SUPPORTI DEI FIANCHI

151-1660	S1-cinghia pelvica a 4 punti
151-2660	S2-cinghia pelvica a 4 punti
151-3660	S3- cinghia pelvica a 4 punti

ACCESSORI PER SUPPORTI DEI PIEDI

151-1745	S1 Pedana poggiapiedi in metallo- Nero
151-2745	S2 Pedana poggiapiedi in metallo- Nero
151-3745	S3 Pedana poggiapiedi in metallo- Nero

151-6123	S1 Pedana poggiapiedi in metallo- Bianco
151-6223	S2 Pedana poggiapiedi in metallo- Bianco
151-6327	S3 Pedana poggiapiedi in metallo- Bianco
151-1746	S1 Pedana poggiapiedi in legno
151-6232	S2 Pedana poggiapiedi in legno
151-3746	S3 Pedana poggiapiedi in legno
151-6125	S1 Pedana poggiapiedi in legno- Bianca
151-6235	S2 Pedana poggiapiedi in legno- Bianca
151-6329	S3 Pedana poggiapiedi in legno- Bianca
152-1600	S1 Sandali completi di cinghie
152-2600	S2 Sandali completi di cinghie
152-3600	S3 Sandali completi di cinghie
151-1755	S1 Cinghie per Pedana poggiapiedi
151-2755	S2 Cinghie per Pedana poggiapiedi
151-3755	S3 Cinghie per Pedana poggiapiedi
151-1760	1" SOLLEVAMENTO SANDALO (PEZZO UNICO) S1 ed S3
151-3760	1" SOLLEVAMENTO SANDALO (PEZZO UNICO) S3
AH01	Paio di Cavigliere Small
AH02	Paio di Cavigliere Medium

ACCESSORI VARI

151-6117	1°Misura Braccioli (Coppia)
151-6226	2°Misura Braccioli (Coppia)
151-3747	3°Misura Braccioli (Coppia)
151-6124	1°Misura Braccioli (Coppia) Bianco
151-6234	2°Misura Braccioli (Coppia) Bianco
151-6328	3°Misura Braccioli (Coppia) Bianco
151-6118-01	1°Misura Pomo a Disco (Verde)-Nero Metallizzato
151-6118-03	1°Misura Pomo a Disco (Blu)-Nero Metallizzato
151-6118-04	1°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6118-05	1°Misura pomo a Disco (Ebano Grigio)-Nero Metallizzato
151-6118-01VIN	1°Misura Pomo a Disco (Verde)-Nero Metallizzato
151-6118-03VIN	1°Misura Pomo a Disco (Blu)-Nero Metallizzato
151-6118-04VIN	1°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6118-07VIN	1°Misura Pomo a Disco (Nero)-Nero Metallizzato
151-6119-01	1°Misura Pomo a Disco (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6119-03	1°Misura Pomo a Disco (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6119-04	1°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6119-05	1°Misura Pomo a Disco (Ebano Grigio)-Bianco Metallizzato
151-6119-01VIN	1°Misura Pomo a Disco (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6119-03VIN	1°Misura Pomo a Disco (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6119-04VIN	1°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Bianco Metallizzato

151-6119-07VIN	1°Misura Pomo a disco (Nero)-Bianco Metallizzato
151-6227-01	2°Misura Pomo a Disco (Verde)-Nero Metallizzato
151-6227-03	2°Misura Pomo a Disco (Blu)-Nero Metallizzato
151-6227-04	2°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6227-05	2°Misura Pomo a Disco (Ebano Grigio)-Nero Metallizzato
151-6227-01VIN	2°Misura Pomo a Disco (Verde)-Nero Metallizzato
151-6227-03VIN	2°Misura Pomo a Disco (Blu)-Nero Metallizzato
151-6227-04VIN	2°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6227-07VIN	2°Misura Pomo a Disco (Nero)-Nero Metallizzato
151-6228-01	2°Misura Pomo a Disco (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6228-03	2°Misura Pomo a Disco (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6228-04	2°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6228-05	2°Misura Pomo a Disco (Ebano Grigio)-Bianco Metallizzato
151-6228-01VIN	2°Misura Pomo a Disco (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6228-03VIN	2°Misura Pomo a Disco (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6228-04VIN	2°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6228-07VIN	2°Misura Pomo a Disco (Nero)-Bianco Metallizzato
151-6322-01	3°Misura Pomo a Disco (Verde)-Nero Metallizzato
151-6322-03	3°Misura Pomo a Disco (Blu)-Nero Metallizzato
151-6322-04	3°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6322-05	3°Misura Pomo a Disco (Ebano Grigio)-Nero Metallizzato
151-6322-01VIN	3°Misura Pomo a Disco (Verde)-Nero Metallizzato
151-6322-03VIN	3°Misura Pomo a Disco (Blu)-Nero Metallizzato
151-6322-04VIN	3°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6322-07VIN	3°Misura Pomo a Disco (Nero)-Nero Metallizzato
151-6323-01	3°Misura Pomo a Disco (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6323-03	3°Misura Pomo a Disco (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6323-04	3°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6323-05	3°Misura Pomo a Disco (Ebano Grigio)-Bianco Metallizzato
151-6323-01VIN	3°Misura Pomo a Disco (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6323-03VIN	3°Misura Pomo a Disco (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6323-04VIN	3°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6323-07VIN	3°Misura Pomo a Disco (Nero)-Bianco Metallizzato
151-6120-01	Pomo cuneiforme S1 (Verde)-Nero Metallizzato
151-6120-03	Pomo cuneiforme S1 (Blu)-Nero Metallizzato
151-6120-04	Pomo cuneiforme S1 (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6120-05	Pomo cuneiforme S1 (Ebano Grigio)-Nero Metallizzato
151-6120-01VIN	Pomo cuneiforme S1 (Verde)-Nero Metallizzato
151-6120-03VIN	Pomo cuneiforme S1 (Blu)-Nero Metallizzato
151-6120-04VIN	Pomo cuneiforme S1 (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6120-07VIN	Pomo cuneiforme S1 (Nero)-Nero Metallizzato
151-6121-01	Pomo cuneiforme S1 (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6121-03	Pomo cuneiforme S1 (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6121-04	Pomo cuneiforme S1 (Lampone)-Bianco Metallizzato

151-6121-05 Pomo cuneiforme S1 (Ebano Grigio)-Bianco Metallizzato

151-6121-01VIN Pomo cuneiforme S1 (Verde)-Bianco Metallizzato

151-6121-03VIN Pomo cuneiforme S1 (Blu)-Bianco Metallizzato

151-6121-04VIN Pomo cuneiforme S1 (Lampone)-Bianco Metallizzato

151-6121-07VIN Pomo cuneiforme S1 (Nero)-Bianco Metallizzato

151-6229-01 Pomo cuneiforme S2 (Verde)-Nero Metallizzato

151-6229-03 Pomo cuneiforme S2 (Blu)-Nero Metallizzato

151-6229-04 Pomo cuneiforme S2 (Lampone)-Nero Metallizzato

151-6229-05 Pomo cuneiforme S2 (Ebano Grigio)-Nero Metallizzato

151-6229-01VIN Pomo cuneiforme S2 (Verde)-Nero Metallizzato

151-6229-03VIN Pomo cuneiforme S2 (Blu)-Nero Metallizzato

151-6229-04VIN Pomo cuneiforme S2 (Lampone)-Nero Metallizzato

151-6229-07VIN Pomo cuneiforme S2 (Nero)-Nero Metallizzato

151-6230-01 Pomo cuneiforme S2 (Verde)-Bianco Metallizzato

151-6230-03 Pomo cuneiforme S2 (Blu)-Bianco Metallizzato

151-6230-04 Pomo cuneiforme S2 (Lampone)-Bianco Metallizzato

151-6230-05 Pomo cuneiforme S2 (Ebano Grigio)-Bianco Metallizzato

151-6230-01VIN Pomo cuneiforme S2 (Verde)-Bianco Metallizzato

151-6230-03VIN Pomo cuneiforme S2 (Blu)-Bianco Metallizzato

151-6230-04VIN Pomo cuneiforme S2 (Lampone)-Bianco Metallizzato

151-6230-07VIN Pomo cuneiforme S2 (Nero)-Bianco Metallizzato

151-6334-01 Pomo cuneiforme S3 (Verde)-Nero Metallizzato

151-6334-03 Pomo cuneiforme S3 (Blu)-Nero Metallizzato

151-6334-04 Pomo cuneiforme S3 (Lampone)-Nero Metallizzato

151-6334-05 Pomo cuneiforme S3 (Ebano Grigio)- Nero Metallizzato

151-6334-01VIN Pomo cuneiforme S3 (Verde)-Nero Metallizzato

151-6334-03VIN Pomo cuneiforme S3 (Blu)-Nero Metallizzato

151-6334-04VIN Pomo cuneiforme S3 (Lampone)-Nero Metallizzato

151-6334-07VIN Pomo cuneiforme S3 (Nero)-Nero Metallizzato

151-6335-01 Pomo cuneiforme S3 (Verde)-Bianco Metallizzato

151-6335-03 Pomo cuneiforme S3 (Blu)-Bianco Metallizzato

151-6335-04 Pomo cuneiforme S3 (Lampone)-Bianco Metallizzato

151-6335-05 Pomo cuneiforme S3 (Ebano Grigio)-Bianco Metallizzato

151-6335-01VIN Pomo cuneiforme S3 (Verde)-Bianco Metallizzato

151-6335-03VIN Pomo cuneiforme S3 (Blu)-Bianco Metallizzato

151-6335-04VIN Pomo cuneiforme S3 (Lampone)-Bianco Metallizzato

151-6335-07VIN Pomo cuneiforme S3 (Nero)-Bianco Metallizzato

151-6239 campionario EDS

Distributed by



 **Leckey**
Kilwee Business Park
Dunmurry
BT17 0HD
Northern Ireland
United Kingdom
T: 028 9060 2277
F: 028 9060 0795
E: info@leckey.com
W: www.leckey.com/

24 hour postural
care for babies,
kids & adults.
Sleeping, Sitting,
Standing, Walking,
Moving, Bathing,
Toileting.



LS333-04