

LECKEY[®]

MYGO STANDER

MANUALE D'USO

SISTEMA PER LA STATICA





Lo standing posturale Mygo può essere sistemato in posizione prona, verticale o supina per consentire un programma terapeutico posturale variegato. Può essere utilizzato da uno o più bambini. Lo standing posturale Mygo favorisce e accresce le funzionalità per bambini con diversi gradi di disabilità e, grazie agli intelligenti supporti per le ginocchia e ai poggipiedi dinamici, consente di sottoporre alla terapia posturale anche quei bambini con contratture fisse del ginocchio fino a 25 gradi. Il suo utilizzo è facile e intuitivo ed è più semplice fare assumere al proprio bambino una posizione eretta, comoda e sicura. Facilita la posizione eretta e, allo stesso tempo, presenta una gamma più vasta di funzionalità complesse. Il presente manuale spiega come utilizzarne tutte le funzioni in modo semplice e veloce. Le istruzioni sulla sicurezza e sulla manutenzione garantiranno un uso del prodotto protratto nel tempo.



Indice

- 01 Destinazione d'uso
- 02 Dichiarazione di Conformità
- 03 Termini di Garanzia
- 04 Documentazione sulla storia del prodotto
- 05 Formazione sull'uso del prodotto
- 06 Informazioni sulla sicurezza
- 07 Come rimuovere dall'imballo ed
assemblare lo standing posturale
- 08 Inserire i rivestimenti
- 09 Configurazione clinica per la gestione
della postura
- 10 Regolazioni frequenti per l'uso
quotidiano
- 11 Informazioni sulla pulizia e sulla
manutenzione
- 12 Controllo quotidiano del prodotto
- 13 Controllo annuale del prodotto
- 14 Ri-assegnare i prodotti Leckey
- 15 Assistenza prodotto
- 16 Informazioni tecniche

1. Destinazione d'uso

Lo standing posturale Mygo viene utilizzato per la posizione prona, supina e verticale. Lo standing posturale Mygo è disponibile in due formati: il formato 1 è destinato ai bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni, mentre il formato 2 è destinato a bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni. Il peso massimo consentito è di 50 kg e 60 kg rispettivamente.

2. Dichiarazione di Conformità C€

Il produttore, James Leckey Design Ltd., dichiara, sotto la propria e unica responsabilità, che lo standing posturale Mygo è conforme ai requisiti della direttiva 93/42/CEE e della norma EN 12182 – Ausili tecnici per persone disabili e metodi di prova.

3 Condizioni della garanzia

1) Le riparazioni o le sostituzioni saranno eseguite dal rivenditore autorizzato Sunrise Medical.

2) Qualora si rendesse necessario fare esaminare il prodotto durante il periodo di validità della garanzia, avvisare immediatamente il rivenditore autorizzato Sunrise Medical, fornendo tutte le informazioni relative al problema verificatosi. Nel caso in cui l'utente si trovi in una località lontana dalla sede del rivenditore Sunrise Medical di riferimento, la riparazione o la sostituzione prevista dalle condizioni di garanzia potrà essere eseguita da un altro tecnico designato da Sunrise Medical.

3) Se è necessario fare riparare o sostituire una parte qualsiasi del prodotto in seguito a un difetto di materiale o di fabbricazione specifico, entro 24 mesi dalla data di acquisto dell'acquirente originale, e sempre che il prodotto sia ancora di sua proprietà, la parte o le parti saranno riparate o sostituite gratuitamente se inviate al rivenditore autorizzato.

4) Per qualsiasi componente riparato o sostituito, l'utente beneficerà di queste disposizioni per il periodo rimanente della garanzia applicabile al prodotto.

5) I componenti sostituiti dopo la scadenza della garanzia originale sono coperti per altri 12 mesi.

6) Le parti soggette ad usura non saranno generalmente coperte da garanzia durante il periodo di garanzia a meno che non presentino dei chiari segni di logorio eccessivo dovuto direttamente a un difetto di fabbricazione. Queste parti includono, ma non si limitano a: rivestimento di stoffa, pneumatici, camere d'aria e parti simili.

7) Le condizioni della garanzia riportate sopra sono valide per tutte le parti del prodotto, per i modelli acquistati a prezzo pieno.

8) In circostanze normali, non si accetta alcuna responsabilità qualora sia stato necessario riparare o sostituire il prodotto come risultato diretto dei seguenti fattori:

a) Il prodotto o una sua parte non sia stato riparato o revisionato in base alle raccomandazioni del produttore, come indicato nel manuale d'uso e/o nel manuale di manutenzione. Non siano state usate solo parti originali.

b) Il prodotto, o parte di esso, siano stati danneggiati per negligenza, incidente o uso improprio.

c) Il prodotto, o parte di esso, sia stato modificato rispetto alle specifiche del produttore o le riparazioni siano state eseguite senza avere avvisato prima il tecnico autorizzato.

La garanzia è valida soltanto se il prodotto viene impiegato alle condizioni prescritte e secondo le destinazioni d'uso specifiche. NON montare componenti NON STANDARD che non siano stati approvati ufficialmente da Sunrise Medical.

Nota: questa garanzia non è trasferibile.

4. Documentazione sulla storia

del prodotto

Il vostro prodotto Leckey è un dispositivo medico di Classe 1 e, in quanto tale, dovrebbe essere prescritto, configurato o riassegnato da personale tecnico competente, che è stato formato sull'uso di questo prodotto.

Leckey consiglia di conservare una documentazione scritta che fornisca le informazioni relative a tutte le impostazioni, i controlli relativi alla riassegnazione del prodotto e i controlli annuali.

5. Documentazione relativa alla formazione sull'uso del prodotto (genitori, insegnanti e assistenti)

Il vostro prodotto Leckey è un dispositivo medico di Classe 1 e, in quanto tale, Leckey raccomanda che genitori, insegnanti e assistenti che fanno uso di questa attrezzatura vengano messi a conoscenza delle seguenti sezioni del presente manuale da personale tecnico competente.

Sezione 6

Informazioni sulla sicurezza

Sezione 9

Configurazione clinica per la gestione della postura

Sezione 10

Regolazioni frequenti per l'uso quotidiano

Sezione 11

Informazioni sulla pulizia e sulla manutenzione

Sezione 12

Controllo quotidiano del prodotto

Leckey consiglia di conservare la documentazione scritta riguardante tutti coloro che sono stati formati all'uso corretto del prodotto.

Firma e timbro del rivenditore

6 Informazioni sulla sicurezza



6.1 Prima dell'uso leggere sempre con attenzione le istruzioni.



6.2 Mentre si usano le attrezzature Leckey, non lasciare mai soli gli utenti.



6.3 Applicare al prodotto solamente componenti approvati da Leckey. Non apportare modifiche al prodotto in nessun modo. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe mettere in pericolo l'utente o l'assistente e annullare la garanzia sul prodotto.



6.4 Qualora ci fossero dubbi sulla persistenza dell'uso in sicurezza del prodotto o nel caso in cui alcune sue parti dovessero rompersi, si prega di interrompere l'uso del prodotto e contattare il nostro customer service o il rivenditore locale il prima possibile.



6.5 Regolare il prodotto in tutte le posizioni e assicurarsi che siano tutte ben salde prima di far sedere l'utente. Per alcune regolazioni potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento che viene fornito con ogni prodotto. Tenere tutti gli strumenti fuori dalla portata dei bambini.



6.6 Quando si fa posizionare l'utente sul telaio per la posizione eretta, per ragioni di sicurezza fissare sempre prima i suoi piedi e le cinghie per lo sterno. Quindi fissare le cinghie per le cosce e le ginocchia.



6.7 Quando lo standing posturale viene utilizzato nella posizione supina, è importante assicurarsi che le pelotte per le ginocchia siano ben salde. Controllare sempre che i bottoni automatici siano chiusi correttamente.



6.8 Anche se lo standing posturale presenta delle ruote, non è un dispositivo per la mobilità. Assicurarsi sempre che i freni delle ruote siano bloccati per tutto il tempo in cui viene utilizzato il telaio, che vengano regolati o anche solo conservati.



6.9 Quando si regola l'inclinazione dello standing posturale Mygo Leckey, assicurarsi che l'utente e tutte le parti del prodotto siano distanti dai mobili circostanti per evitare possibili collisioni.



6.10 È possibile regolare la posizione accuratamente e in sicurezza anche quando l'utente è posizionato nel prodotto. Ma è importante sostenere tutte le pelotte quando vengono regolate mentre l'utente è posizionato nel prodotto.



6.11 Non lasciare mai il prodotto su superfici con pendenze maggiori di 5 gradi. Ricordarsi sempre di bloccare tutte le rotelle.



6.12 Il prodotto contiene componenti che potrebbero costituire un rischio di soffocamento per bambini piccoli. Controllare sempre che le manopole e i bulloni di bloccaggio raggiungibili dal bambino siano sempre ben serrati e saldi.



6.13 I prodotti Leckey sono conformi al regolamento sulla sicurezza contro l'incendio ai sensi della norma EN 12182. Tuttavia, il prodotto contiene componenti in plastica e, quindi, dovrebbe essere tenuto lontano da tutte le fonti dirette di calore come fiamme libere, sigarette, riscaldatori elettrici e a gas.



6.14 Non posizionare mai oggetti caldi sul vassoio di lavoro perché potrebbero danneggiare la plastica.



6.15 Pulire regolarmente il prodotto. Non utilizzare detergenti abrasivi. Effettuare controlli di manutenzione regolari per assicurarsi che il prodotto funzioni correttamente









6.16 The product is designed for indoor use and when not in use should be stored in a dry place that is not subjected to extremes of temperature. The safe operating temperature range of the product is +5° to +40° Celsius.

Come rimuovere dall'imballo ed assemblare lo standing posturale

Il vostro standing posturale Mygo vi verrà consegnato smontato in una scatola di cartone. Innanzitutto, tirare fuori tutto il contenuto della scatola e controllare tutte le parti ordinate.

Per assemblare il prodotto con lo standing posturale in posizione verticale, sollevarlo dalla traversa (A), posizionare i tubi verticali fra le alette libere della base e allineare i fori (B) (la scanalatura nel tubo verticale dovrebbe aiutare il posizionamento).

Aggiungere i bulloni e serrare (C). Ripetere dall'altra parte. Quindi sollevare l'attuatore manuale sulle alette libere nella traversa ed allineare i fori, quindi aggiungere i bulloni e serrare (D).

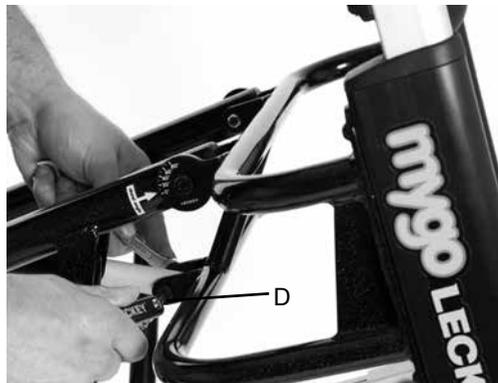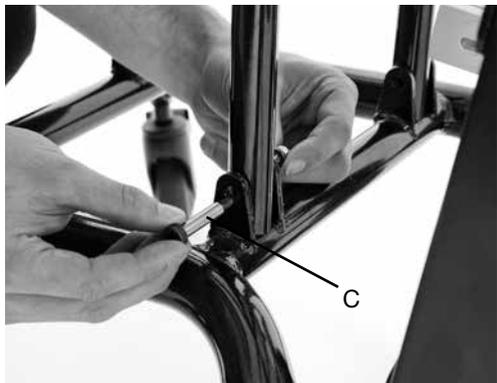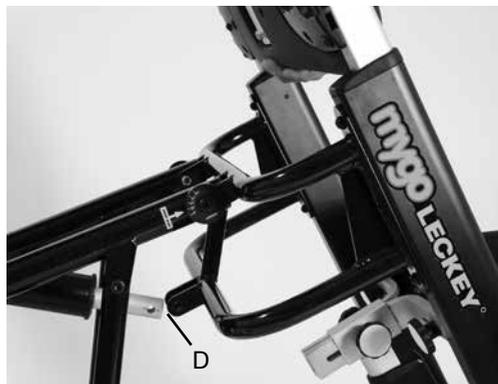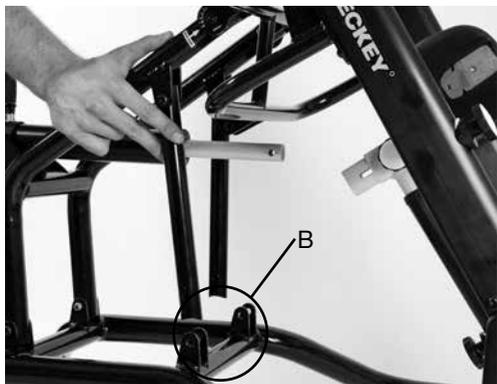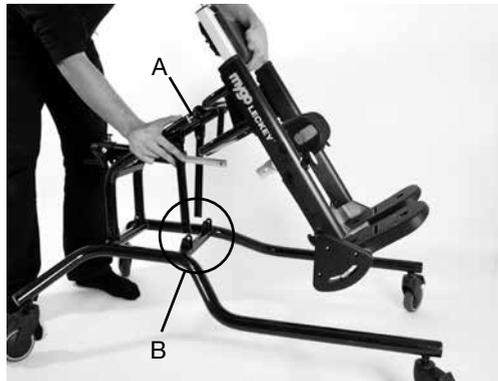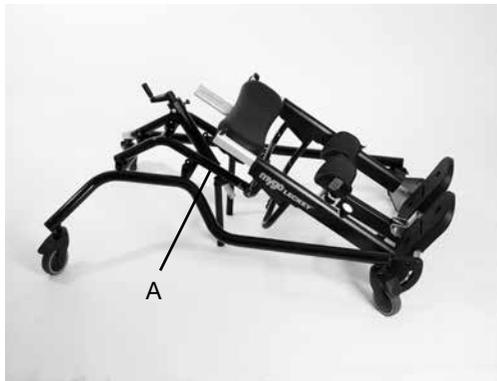

7.1 Strumento multi uso

Una serie di regolazioni richiederanno l'utilizzo di uno strumento multiuso fornito con ciascun prodotto.

7.2 Come collegare il supporto toracico

Rimuovere la vite del supporto toracico, posizionare il supporto sull'estrusione metallica all'altezza desiderata, rimettere la vite e serrare.



7.3 Come collegare il tavolino al suo alloggiamento

Prima di tutto, assicurarsi che il modello del tavolino sia quello adatto al formato dello standing posturale.

Per il formato 1, le staffe presenti sulle barre del tavolino dovrebbero essere rivolte in fuori (a).





Per il formato 2, le staffe presenti sulle barre del tavolino dovrebbero essere rivolte in dentro (b).

Se c'è bisogno di modificare la configurazione: rimuovere i bulloni Allen (c), scambiare le barre di posto (d), rimettere i bulloni Allen e serrare nuovamente (e).

Prima di inserire gli alloggiamenti del tavolino, occorre rimuovere la piastra del morsetto atta alla regolazione dell'altezza del tavolino dal momento che è contenuta in cima




all'estrusione della pelotta per l'anca. Per farlo, allentare la manopola in cima alla pelotta per l'anca (f) e spingerla, questo farà sì che la piastra del morsetto venga rimossa dalla barra dell'alloggiamento del tavolino. Quindi inserire la barra dell'alloggiamento del tavolino in cima all'estrusione della pelotta per l'anca (g), spostarla in basso, per raggiungere l'altezza desiderata e riserrare bene la manopola.

Ripetere l'operazione per la parte opposta. Ora è possibile inserire il tavolino, infilando le apposite barre negli alloggiamenti alla profondità desiderata dal davanti per la posizione prona e dal di dietro per la posizione supina, quindi riserrare bene tramite la manopola presente sull'alloggiamento (h).

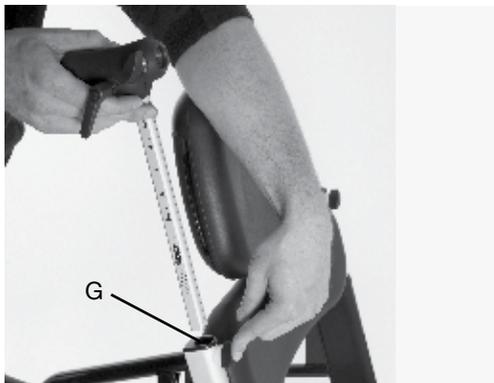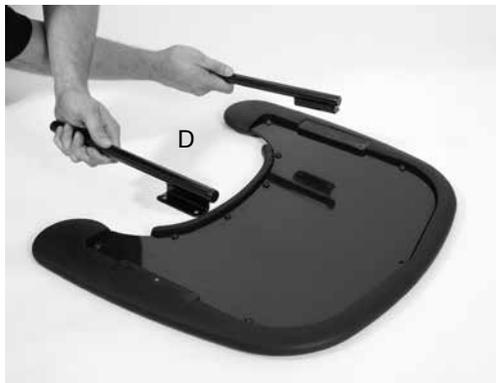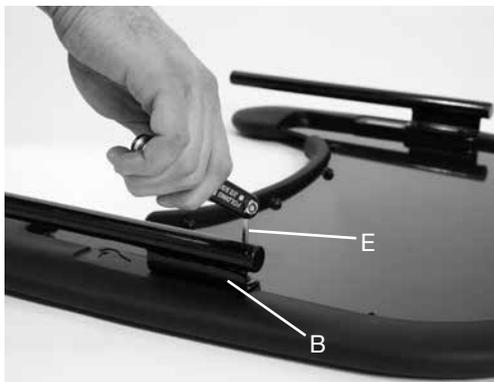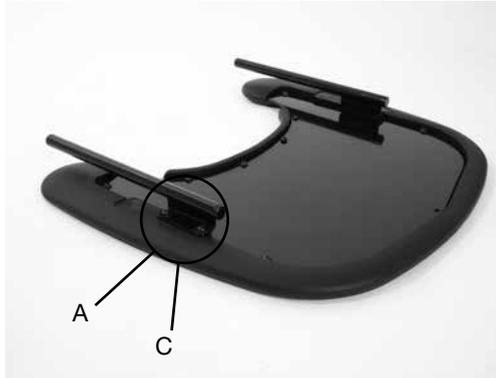



7.4 Inserire il bullone di collegamento nei Sandali

Inserire il bullone di collegamento (a) nella linguetta di arresto (b). Posizionare la cover di gomma (c) sopra e sotto il sandalo fissandolo con le quattro viti in dotazione (d). Per rimuovere o riposizionare i bulloni di collegamento ripetere a ritroso il processo.

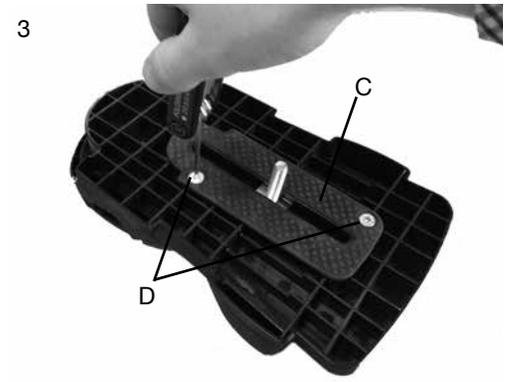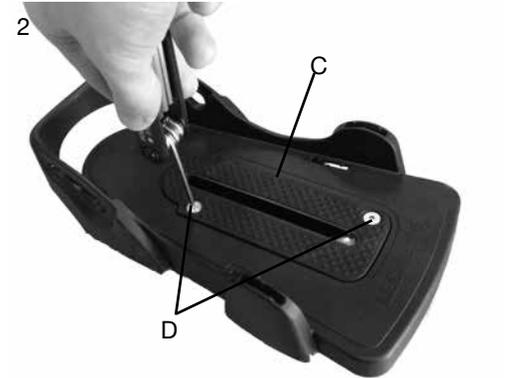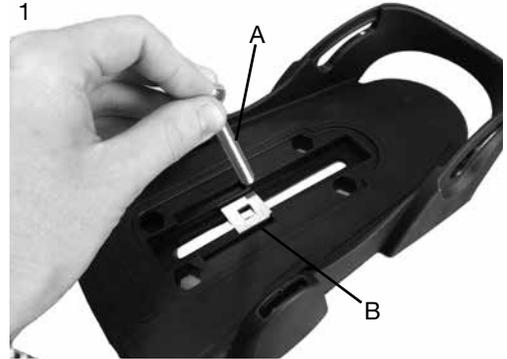

7.5 Fissare i Sandali

Posizionare il sandalo in modo tale da poter inserire il bullone di collegamento nell'apposita fessura nella pedana poggiapiedi. Per fissarlo, posizionare sul lato inferiore del sandalo la rondella in gomma (a), la rondella in metallo (b) e la manopola (c) nel bullone di collegamento. Per posizionare i sandali è sufficiente svitare la manopola (c) posizionata sotto la pedana poggiapiedi, selezionare la posizione e riavvitarla.

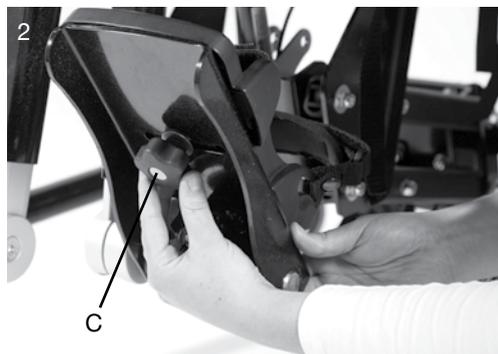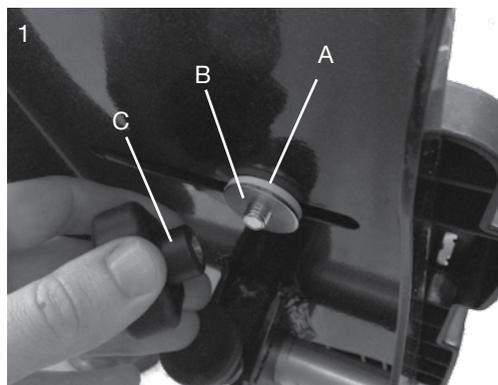



7.6 Come collegare il supporto per le spalle per la posizione supina

Per collegare il supporto per le spalle allo standing posturale, inserire il bullone Allen nel foro in fondo al retro del supporto per lo sterno come mostrato in figura (a). Posizionare il supporto per le spalle sul bullone Allen inserito (b) e fissarlo con gli altri due bulloni Allen in dotazione.



7.7 Come collegare il poggiatesta per la posizione supina

Il poggiatesta non può essere utilizzato senza il supporto per le spalle nella posizione supina. Per collegare il poggiatesta, posizionare il relativo morsetto sul supporto per le spalle (A) e fissarlo utilizzando il bullone Allen in dotazione. Quindi fare scorrere l'asta del poggiatesta nella staffa di alloggiamento (B), impostare l'altezza richiesta e fissarla tramite la leva manuale (C).

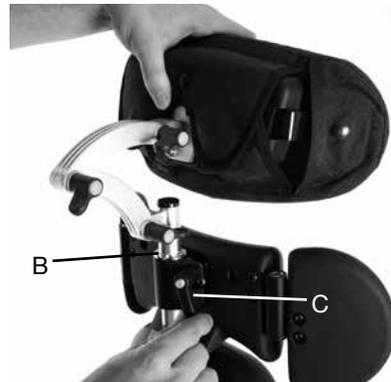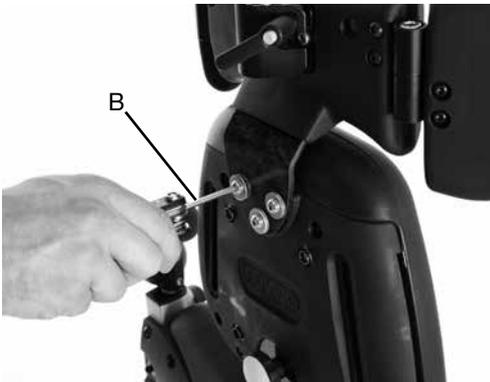


7.8 Collegare le cinghie per le ginocchia

Prima di tutto, è necessario infilare le cinghie nell'anello di plastica D come mostrato in figura (A).

Per attaccare le cinghie per le ginocchia, inserire il bottone automatico di plastica (B) nella fibbia (C) sul lato del supporto per le ginocchia principale. Quindi prendere le estremità dei cinturini (D) e tirare con fermezza lontano dall'utente in modo da fissare il cinturino intorno alla sua gamba.

Per rimuovere il cinturino è sufficiente schiacciare le linguette sopra e sotto al bottone automatico di plastica (B) e il cinturino verrà rilasciato.



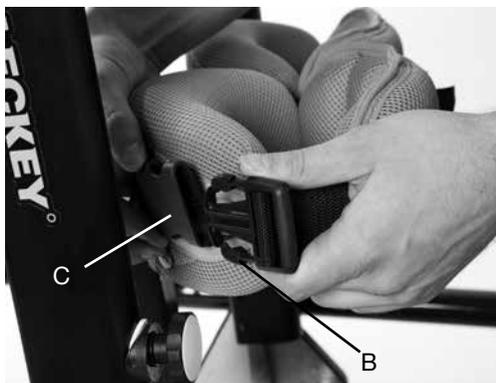


7.9 Collegare i solleva sandali

Se i solleva sandali sono stati ordinati, collegarli posizionandoli sulle apposite rientranze a mattoncino sul poggiaiedi (A e B). Mettere sopra il sandalo e fissare con il relativo bullone (come in 7.4).

7.10 Collegare la staffa della cintura per l'anca

Prima di poter collegare la cintura per la derotazione dell'anca sarà necessario innanzitutto collegare la staffa della cintura per l'anca. A tal fine, fare scorrere la staffa nelle fessure di alloggiamento situate nel telaio metallico della pelotta per l'anca (A) e fissarla con il bullone Allen e la rondella in dotazione (B). Ripetere l'operazione per la parte opposta. La cintura per la derotazione dell'anca non necessita dei supporti laterali per le anche.

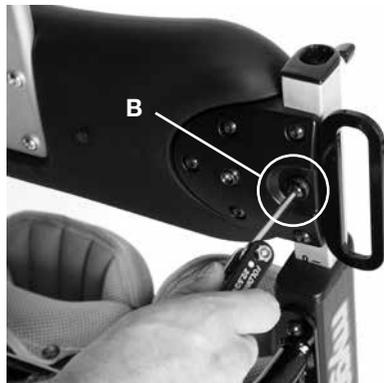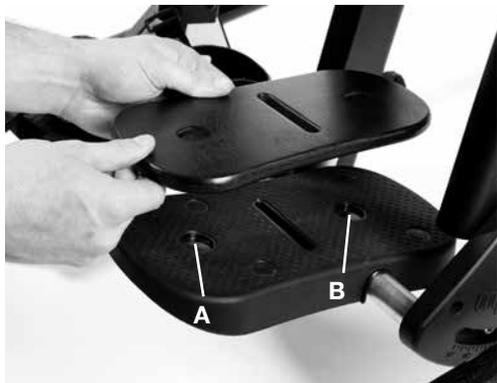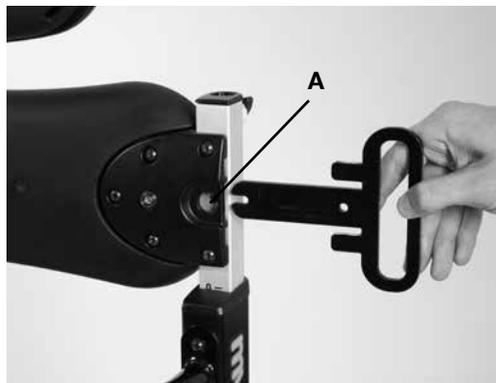



7.11 Collegare i supporti laterali per le anche

Con la cinghia avvolgente per le anche sono necessari i relativi supporti laterali. Per collegare i supporti laterali per le anche, fare scorrere la staffa nella fessura di alloggiamento situata nel telaio metallico della pelotta per l'anca (a) e fissare il tutto con la rondella e i bulloni Allen in dotazione (b). Ripetere l'operazione per la parte opposta.



7.12 Collegare gli alloggiamenti del supporto posteriore e del divaricatore

Se è necessario un supporto posteriore, collegare per prima cosa il relativo alloggiamento facendo scorrere la staffa nelle fessure di alloggiamento del telaio metallico della pelotta per l'anca (a) e fissare il tutto con la rondella e i bulloni Allen in dotazione (b). Ripetere l'operazione per la parte opposta.

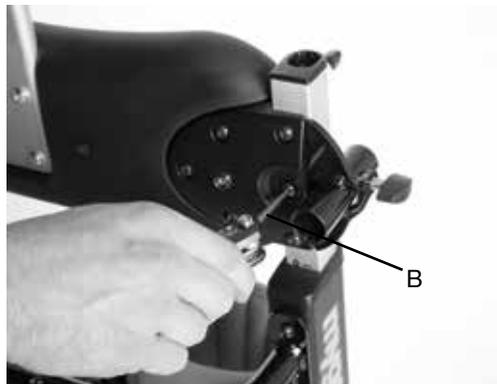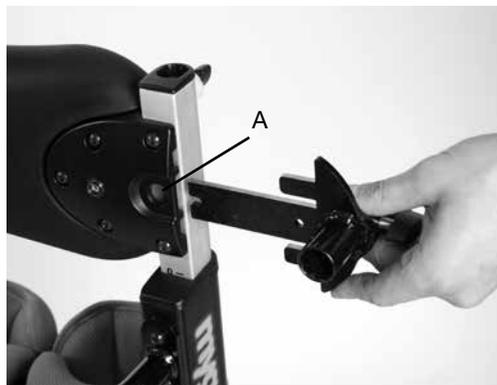



7.13 Collegare i supporti laterali per lo sterno standard, complessi e ribaltabili

Collegare l'alloggiamento del divaricatore
Collegare l'alloggiamento del divaricatore (C)
alla staffa (D) della pelotta per l'anca tramite i
bulloni Allen in dotazione (E).

Con la cinghia sternale avvolgente sono
necessari i relativi supporti laterali.



Tirare indietro il supporto sternale in
poliuretano per accedere (A). Quindi inserire la
staffa laterale e le sagome per la regolazione
dell'inclinazione nel supporto sternale, come
mostrato in figura (B), assicurandosi di
inserire le borchie di plastica nella fessura del
supporto sternale (C).

Quindi fissare il tutto dall'esterno con il bullone
Allen e la rondella in dotazione (D). Ripetere
l'operazione per la parte opposta.

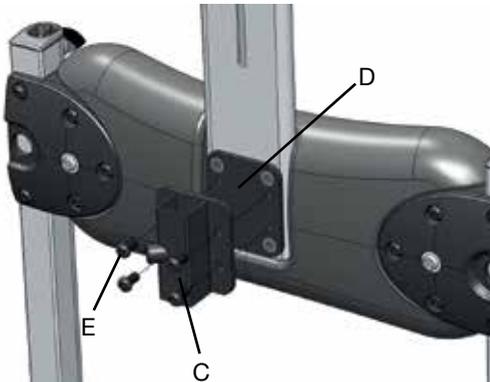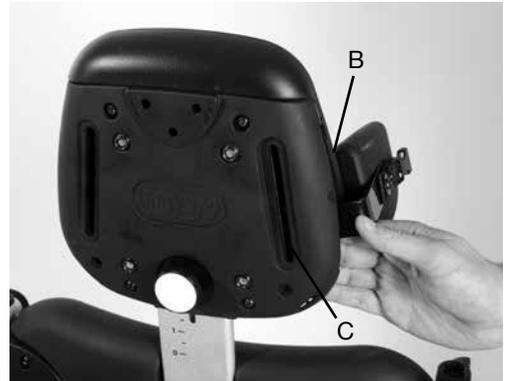

7.14 Collegare la cinghia avvolgente per lo sterno/per le anche


Per collegare la cinghia avvolgente per lo sterno/per le anche, fare scorrere le imbottiture nel supporto laterale in poliuretano con i lembi rivolti verso l'esterno dello standing posturale (a), inserire la fibbia di plastica (b) nel foro del rivestimento, quindi portare le fascette di fissaggio in velcro (c) intorno al supporto laterale in poliuretano e attaccarle al pannello di velcro, come mostrato in figura. Chiudere il lembo (d). Ripetere l'operazione per la parte opposta.

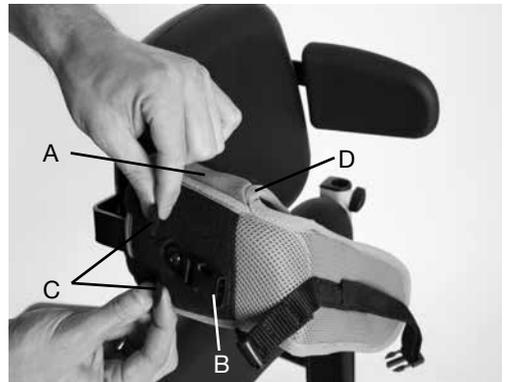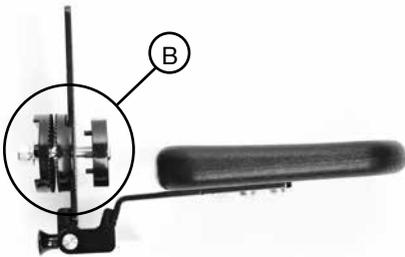


7.15 Collegare la cinghia pelvica

A seconda della posizione prona o supina, si utilizza una cinghia pelvica diversa. In posizione prona, la cinghia pelvica dovrebbe essere prima attaccata all'utente, possibilmente su un tappetino. La cinghia pelvica interna viene avvolta intorno al bacino dell'utente, quindi, una volta che l'utente è stato assicurato al telaio (con i piedi e il torace), le cinghie più lunghe vengono fatte scivolare attraverso le barre della cintura sulla pelotta per le anche (A) e fissate saldamente intorno all'utente. La cinghia di sicurezza, la fibbia di plastica e il bottone automatico dovrebbero essere fissati per far sì che la cinghia pelvica non si slacci accidentalmente (B).

In posizione supina, la cinghia pelvica dovrebbe rimanere attaccata al prodotto. Una volta che l'utente è stato assicurato al telaio (con i piedi e il torace), la cinghia pelvica interna viene avvolta intorno al bacino dell'utente (C), quindi le cinghie più lunghe (D) vengono fatte scivolare attraverso le barre della cintura sulla pelotta per le anche (non ci sono già) (E) e fissate saldamente intorno all'utente. La cinghia di sicurezza, la fibbia di plastica e il bottone automatico dovrebbero essere fissati per far sì che la cinghia pelvica non si slacci accidentalmente (F).

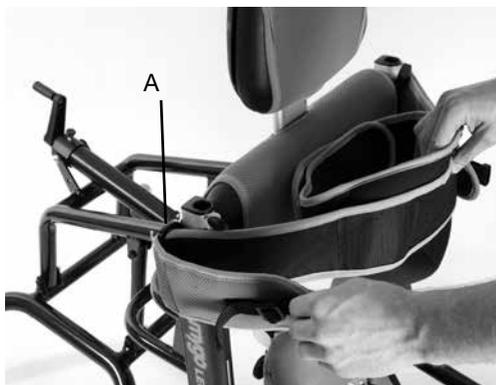

**Inserire i
rivestimenti**


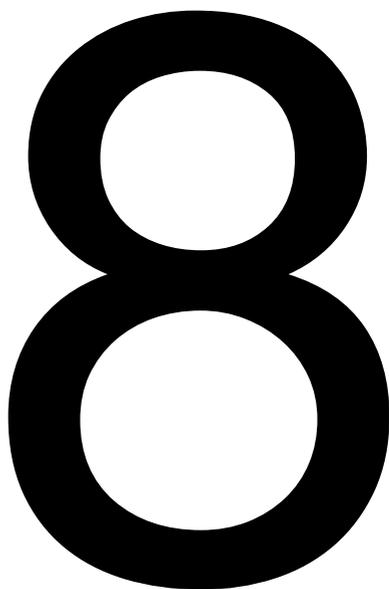


8.1 Rivestimenti dei supporti per le ginocchia

Avvolgere i rivestimenti intorno ai supporti per le ginocchia e fissarli spingendo verso il basso i quattro bottoni automatici. Ce ne sono due da ogni lato del supporto per le ginocchia (A). Ripetere l'operazione per l'altro supporto.

8.2 Rivestimenti delle pelotte per le anche

Posizionare il rivestimento sopra alla pelotta per l'anca orientandolo correttamente). Avvolgere il lembo inferiore sotto la pelotta per l'anca e spingere verso il basso i bottoni automatici per fissarlo (A), quindi avvolgere i lembi superiori del rivestimento sopra alla cima della pelotta per l'anca e spingere verso il basso i relativi bottoni automatici per fissarli (A).

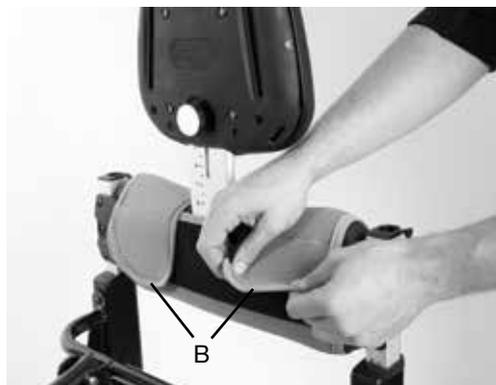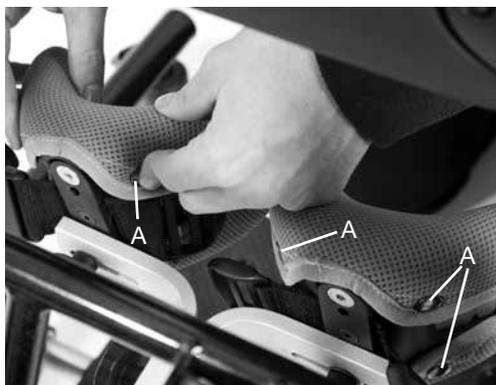


8.3 Rivestimento del supporto sternale

Avvolgere il rivestimento sulla sommità del supporto sternale e fissarlo spingendo verso il basso i bottoni automatici (a). Quindi avvolgere la parte inferiore sotto il supporto e spingere verso il basso i relativi bottoni automatici per fissarla (B).



8.4 Supporto per le spalle

Seguire le istruzioni riportate al punto 9.9 per inclinare i supporti laterali per le spalle verso l'interno, fare scorrere il rivestimento sopra alle ali del supporto per le spalle (A) e fissarlo con i bottoni automatici (B).

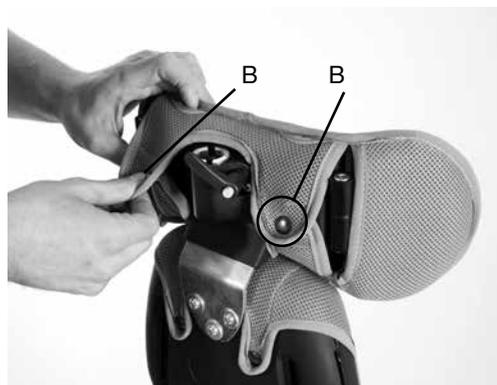


8.5 Imbottitura e rivestimento del poggiatesta

Posizionare l'imbottitura sul poggiatesta. Fissare il gancio centrale (A). Portare il lembo inferiore sotto al poggiatesta (B) e fissarlo con i due ganci laterali rimasti (C).




Configurazione clinica per la gestione della postura

La configurazione clinica del prodotto dovrebbe essere effettuata da personale tecnico e clinico competente, che è stato formato sull'uso di questo prodotto. Leckey consiglia di conservare una documentazione scritta riguardante tutte le configurazioni cliniche del prodotto.

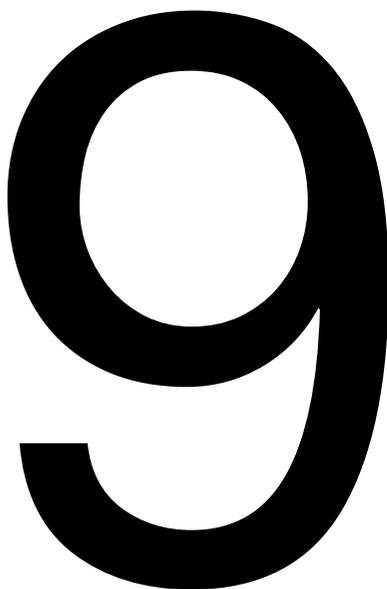


9.1 Regolazione dell'altezza delle anche

Per regolare l'altezza delle anche, allentare le manopole posizionate in entrambi i lati dello standing posturale (A), spostare la pelotta per l'anca all'altezza desiderata e riserrare bene le manopole.

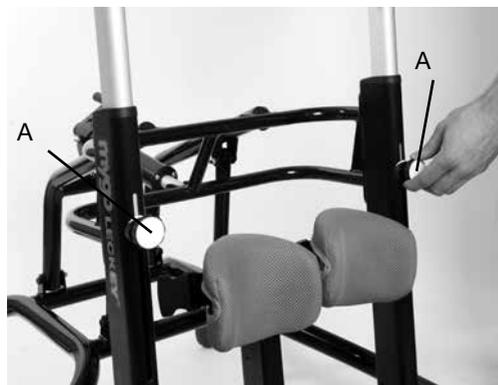



9.2 Regolazione dell'altezza del supporto toracico e per le spalle

Per regolare l'altezza del supporto toracico e per le spalle rispetto alla pelotta per l'anca, allentare la manopola posizionate dietro al supporto toracico (A), regolare l'altezza desiderata e riserrare bene.

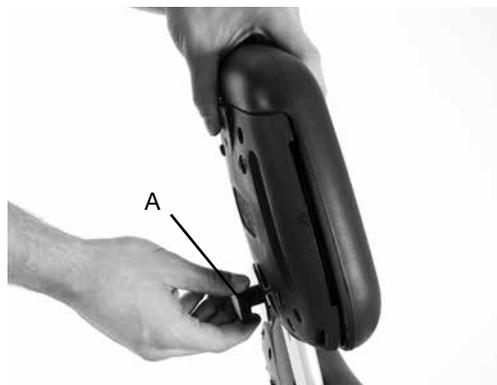

9.3.1 Regolazione dei supporti per le ginocchia

L'altezza, la profondità e la posizione laterale dei supporti per le ginocchia possono essere regolati indipendentemente le une dalle altre. Per modificare l'altezza dei supporti per le ginocchia, allentare la manopola posizionata dietro alla barra in corrispondenza delle ginocchia (A), regolare l'altezza desiderata e riserrare. Per modificare la profondità di ciascuno dei supporti per le ginocchia, allentare la manopola posizionata di fianco alla barra in corrispondenza delle ginocchia (B), regolare la profondità desiderata e riserrare bene. Per modificare la posizione laterale delle ginocchia, allentare la manopola posizionata dietro alla pelotta per le ginocchia (C), regolare la posizione desiderata e riserrare bene.

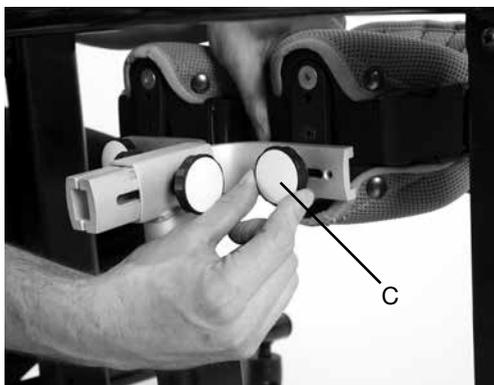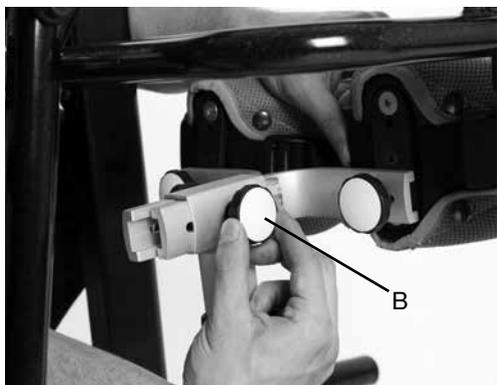

9.3.2 Collegare le staffe di allungamento per le ginocchia

Allentare la manopola (C) e rimuovere il supporto per le ginocchia. Fare scorrere la staffa di allungamento lungo la staffa per le ginocchia e fermarla con una rondella in gomma bianca, una argentata, un distanziatore in plastica e una manopola.


Fissare i supporti per le ginocchia alle staffe di allungamento all'altezza desiderata utilizzando una rondella di gomma nera, una rondella nera e una vite M6.

9.4 Regolazione adatta all'angolo della contrattura

Se possibile, il poggiatesta oscillante dovrebbe essere regolato quando il cliente non si trova sullo standing posturale Mygo. Tuttavia, in certe circostanze potrebbe essere necessario o preferibile regolare l'angolo del poggiatesta oscillante quando il cliente si trova sullo standing posturale. Per effettuare questo procedimento sono necessarie due persone competenti: una che si occupi della regolazione e una che valuti il comfort del cliente durante la regolazione. Inoltre, è meglio eseguire l'operazione con lo standing posturale in posizione orizzontale.

In posizione diritta o prona:

Valutare quanti e quali movimenti riesce a fare il cliente, il tono muscolare, ecc., su un supporto e determinare la postura eretta migliore prima di far accomodare il cliente sullo standing posturale.

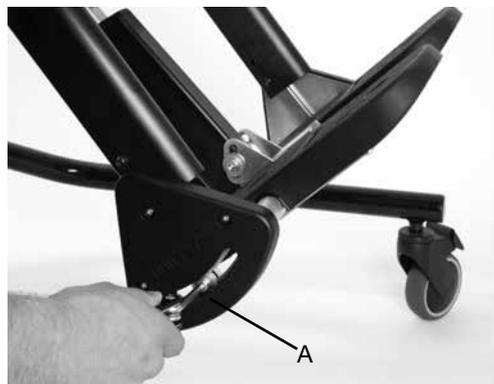

9.5 Posizionare i sandali

Posizionare il cliente sullo standing posturale Mygo. Sostenendo con cura la testa e le spalle, mettere il cliente in posizione orizzontale. Aprire le cinghie per le ginocchia e dei sandali. Allentare il bullone Allen (A) su entrambi i lati del poggiapiedi oscillante assicurandosi che il peso delle ginocchia dell'utente sia sostenuto da un assistente; se necessario, regolare l'angolo del poggiapiedi oscillante, accertandosi sempre del comfort dell'utente; quindi riserrare bene i bulloni. Poi chiudere le cinghie per le ginocchia e dei sandali. Rimettere il cliente in posizione eretta prona.

In posizione supina:

Valutare quanti e quali movimenti riesce a fare il cliente, il tono muscolare, ecc., su un supporto e determinare la postura eretta migliore prima di far accomodare il cliente sullo standing posturale. Posizionare il cliente sullo standing posturale Mygo e mettere quest'ultimo in posizione orizzontale. Aprire le cinghie per le ginocchia e dei sandali. Allentare il bullone Allen (A) su entrambi i lati del poggiapiedi oscillante assicurandosi che il peso delle ginocchia dell'utente sia sostenuto da un assistente; se necessario, regolare l'angolo del poggiapiedi oscillante, accertandosi sempre del comfort dell'utente; quindi riserrare bene i bulloni. Poi chiudere le cinghie per le ginocchia e dei sandali. Regolare nuovamente lo standing posturale fino a raggiungere l'angolo desiderato per la posizione eretta supina.

Ogni sandalo è attaccato al singolo poggiapiedi con un unico bullone di fissaggio. Il poggiapiedi si trova in una capsula di gomma per assicurare che i sandali non scivolino una volta fissati. Posizionare i piedi dell'utente nei sandali e fissarli con i cinghietti in modo da mantenerli fermi al proprio posto. I cinghietti dovrebbero essere posizionati sul dorso e sulle dita del piede. Il cinghietto frontale può essere assicurato ad una delle due fessure posizionate sui lati del sandalo in base alla misura del piede dell'utente (2).




Se il bambino indossa sandali o calzature leggere controllare i cinghietti per assicurarsi che non irritino la pelle.

1



2

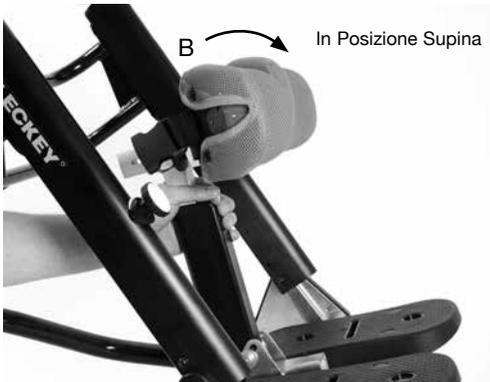


9.6 Inclinazione secondaria del poggiapiedi

Per impostare l'inclinazione adatta alla flessione plantare o dorsale: allentare il bullone Allen posizionato nella barra all'altezza delle ginocchia all'interno del poggiapiedi (a), sistemare nella posizione desiderata e riserrare bene il bullone.

La flessione di 10° può essere adattata in ogni direzione.

9.7 Regolazione dei supporti laterali per le anche

Per impostare la larghezza dei supporti laterali per le anche: allentare i bulloni Allen sul retro della pelotta per l'anca (a), regolare la larghezza desiderata e riserrare.

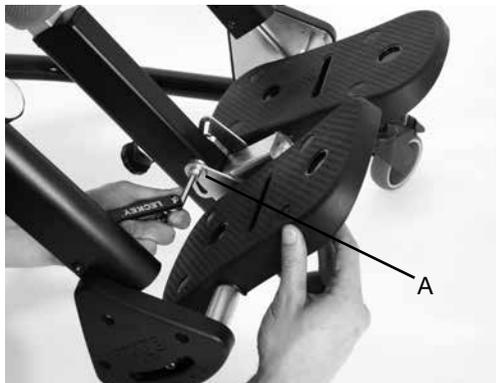

9.8 Regolare i supporti laterali sternali standard, complessi e ribaltabili

Per regolare l'altezza e l'inclinazione dei supporti laterali, allentare il bullone Allen (A), impostare la larghezza, l'altezza e l'inclinazione desiderate, quindi riserrare bene.

Supporti laterali complessi

È anche possibile regolare l'angolazione dei supporti laterali complessi per consentire alla pelotta di adattarsi alla conformazione fisica dell'utente. Per regolare, allentare la vite (B) al centro della pelotta, regolarne l'angolazione secondo la posizione desiderata e serrare nuovamente la vite. I supporti laterali sono ribaltabili per agevolare il trasporto. A questo scopo tirare il perno (C) posteriore e rimuovere il supporto facendolo ruotare



9.9 Supporto per le spalle

Per regolare l'inclinazione dei supporti laterali per le spalle: allentare il bullone Allen (A), spostare i supporti laterali fino a raggiungere l'inclinazione desiderata, quindi riserrare.






9.10 Poggiatesta

Per regolare la profondità, l'altezza e l'inclinazione del poggiatesta: allentare le manopole (A) e, quando si raggiunge la posizione desiderata, serrarle nuovamente. Non rimuovere il poggiatesta mentre l'utente si trova nello standing posturale.



9.11 Collegare e regolare il supporto posteriore e il divaricatore

Per regolare il supporto posteriore, allentare il bullone Allen dell'alloggiamento (A), fare scorrere le barre esterne all'interno degli alloggiamenti (B) fino a raggiungere la profondità desiderata, quindi serrare (A).

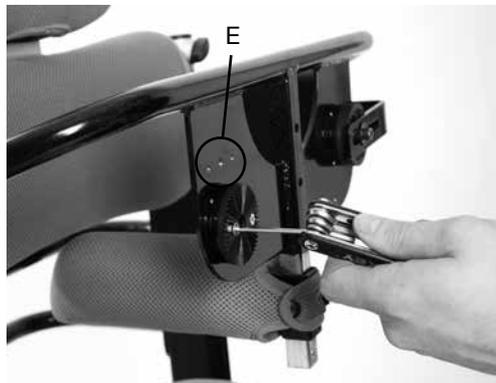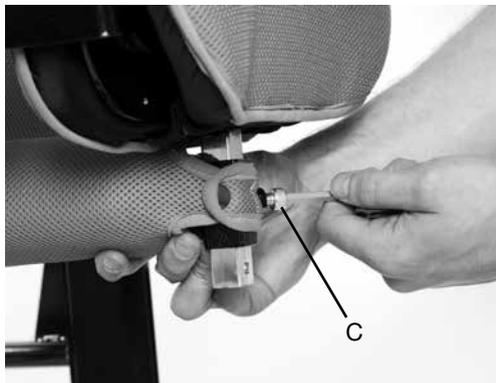
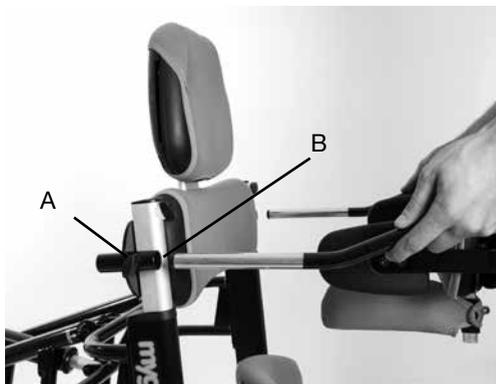


9.12 Aumentare la regolazione del tavolino

Collegare e regolare il divaricatore



Per collegare il divaricatore, allentare il bullone Allen dell'alloggiamento (C), fare scorrere il divaricatore nell'alloggiamento (d) e serrare alla profondità desiderata. Anche l'altezza può essere regolata tramite il bullone Allen (E) situato dietro dal divaricatore.

Per aumentare la regolazione della profondità del tavolino, riposizionare le barre del tavolino più indietro. Per farlo, svitare i bulloni Allen che sostengono le barre del tavolino (A), spostare le barre nei fori più indietro (B), rimettere i bulloni e riserrarli bene.

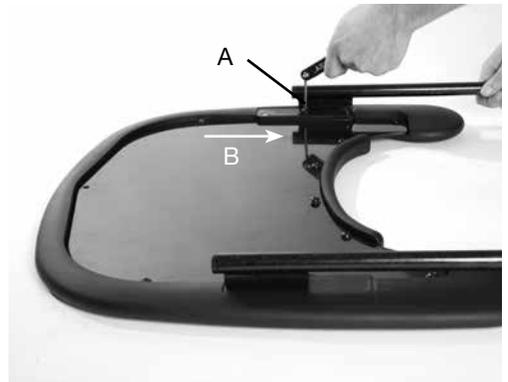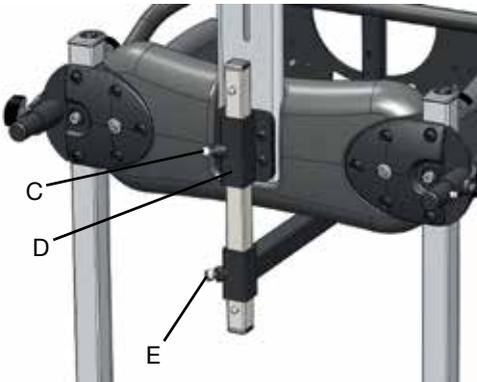

9.13 Collegare e regolare la struttura gioco sospesa del tavolino


Per collegare la struttura gioco sospesa, per prima cosa occorre rimuovere le barre del tavolino. Per farlo, svitare i bulloni Allen che sostengono le barre del tavolino (A) (annotarsi la posizione dei fori utilizzati). Posizionare la lastra distanziatrice (B), quindi la lastra a fessura (C). Fissare con la barra del tavolino nei fori originali tramite le viti lunghe in dotazione (D). Ripetere l'operazione per la parte opposta.

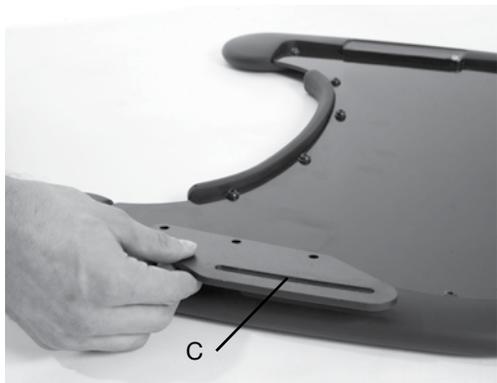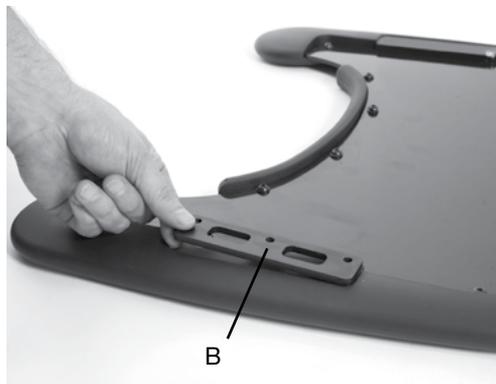

9.14 Modifiche all'inserto del tavolino

Collegare le staffe di alloggiamento (E) della struttura gioco sospesa come mostrato in figura. Posizionare la struttura gioco sospesa nella staffa di alloggiamento. Regolare l'altezza desiderata e serrare (F) da entrambi i lati.

Per sostituire diversi inserti del tavolino, in primo luogo rovesciarlo, quindi rimuovere i bulloni Allen tenendo fermo l'inserto attuale (A) e l'imbottitura protettiva del tavolino (se presente). Rimuovere il vecchio inserto (B) e sostituirlo con uno nuovo, quindi fissarlo al tavolino e aggiungere l'imbottitura protettiva tramite gli stessi bulloni Allen.

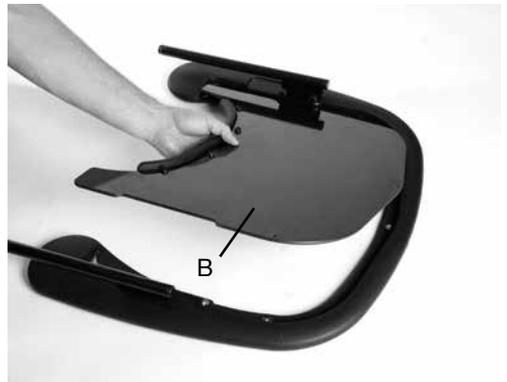

Regolazioni frequenti per l'uso quotidiano

Occorre insegnare a genitori e assistenti come effettuare le regolazioni più frequenti oltre che insegnare loro i controlli di sicurezza illustrati nella sezione 6. Il tutto deve essere effettuato da un tecnico competente in materia e nell'uso del prodotto. Leckey consiglia di conservare la documentazione scritta riguardante i genitori e tutti gli assistenti che sono stati formati all'uso corretto del prodotto.

10

10.1 Trasferire l'utente da e nello standing posturale


Prima di mettere il bambino nello standing posturale è necessario effettuare i controlli quotidiani sul prodotto come descritti alla sezione 12 del presente manuale. Si raccomanda di non trasferire mai gli utenti direttamente dalla posizione seduta a quella eretta senza preparazione e stretching. Questo è meglio farlo da sdraiati su un tappetino ma può essere fatto anche su una sedia a rotelle o su un sistema di postura, se necessario. Prima di trasferire il bambino nel prodotto, bloccare tutte le rotelle e assicurarsi che siano rivolte verso l'esterno per aumentare la stabilità del prodotto. Assicurarsi che le cinghie sulla pelotta sternale, la cinghia pelvica e le cinghie per le ginocchia siano sganciati e non ingombrino lo spazio, per facilitare il trasferimento.

10.2 Impostare l'inclinazione dello standing posturale

Sia che venga usato in posizione supina o prona, l'inclinazione del telaio può essere facilmente impostato tirando e girando il perno di bloccaggio (A) e girando la maniglia (B) fino a raggiungere l'inclinazione desiderata (è possibile leggere l'inclinazione sulla traversa) (C). Girare la maniglia in senso orario per raddrizzarlo e in senso antiorario per indirizzarlo verso la posizione orizzontale. Lo standing posturale può essere impostare da verticale (0°) fino ad orizzontale (80°) con regolazioni da 10° per volta. Questo può essere fatto con il bambino sistemato sul prodotto.



Assicurarsi che il prodotto e l'utente siano lontani dai mobili circostanti per evitare eventuali collisioni mentre si regola l'inclinazione.

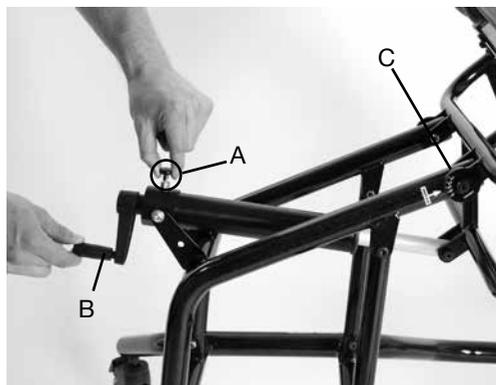

10.3 Posizionare i Sandali

Posizionare i piedi dell'utente nei sandali e fissarli con i cinghietti in modo da mantenerli fermi al proprio posto. I cinghietti dovrebbero essere posizionati sul dorso e sulle dita del piede. Il cinghietto frontale può essere assicurato ad una delle due fessure posizionate sui lati del sandalo in base alla misura del piede dell'utente (2).



Se il bambino indossa sandali o calzature leggere controllare i cinghietti per assicurarsi che non irritino la pelle.


10.4 Cinghie per le ginocchia

Per attaccare le cinghie per le ginocchia, inserire il bottone automatico di plastica (a) nella fibbia (b) sul lato del supporto per le ginocchia principale. Quindi prendere le estremità dei cinturini (c) e tirare con fermezza lontano dall'utente in modo da fissare il cinturino intorno alla sua gamba. Per rimuovere il cinturino è sufficiente schiacciare le linguette sopra e sotto al bottone automatico di plastica e il cinturino verrà rilasciato.



Controllare sempre con il terapeuta se le cinghie sono tirate correttamente per il bambino, dal momento che la rotula è un'area sensibile e una forza eccessiva potrebbe causare delle lesioni.

1

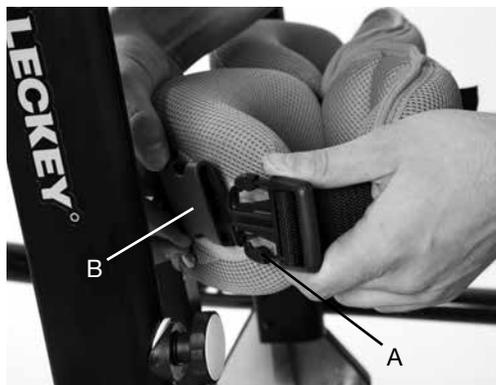



2



10.5 Posizionare e collegare la cinghia pelvica

A seconda della posizione prona o supina, si utilizza una cinghia pelvica diversa. In posizione prona, la cinghia pelvica dovrebbe essere prima attaccata all'utente, possibilmente su un tappetino. La cinghia pelvica interna viene avvolta intorno al bacino dell'utente, quindi, una volta che l'utente è stato assicurato al telaio (con i piedi e il torace), le cinghie più lunghe vengono fatte scivolare attraverso le barre della cintura sulla pelotta per le anche (A) e fissate saldamente intorno all'utente. La cinghia di sicurezza, la fibbia di plastica e il bottone automatico dovrebbero essere fissati per far sì che la cinghia pelvica non si slacci accidentalmente (B).

In posizione supina, la cinghia pelvica dovrebbe rimanere attaccata al prodotto. Una volta che l'utente è stato assicurato al telaio (con i piedi e il torace), la cinghia pelvica interna viene avvolta intorno al bacino dell'utente (C), quindi le cinghie più lunghe (D) vengono fatte scivolare attraverso le barre della cintura sulla pelotta per le anche (non ci sono già) (E) e fissate saldamente intorno all'utente. La cinghia di sicurezza, la fibbia di plastica e il bottone automatico dovrebbero essere fissati per far sì che la cinghia pelvica non si slacci accidentalmente (F).

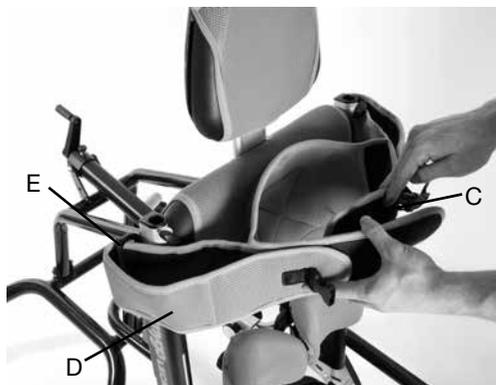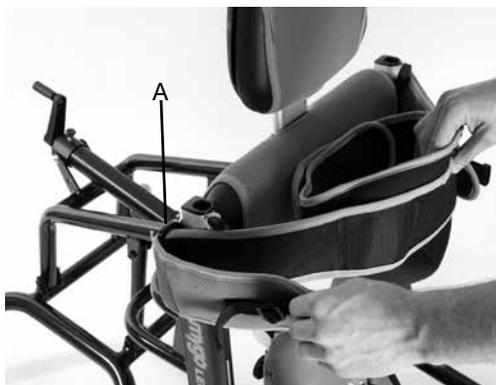

10.6 Cinghia laterale avvolgente


Per aprire la cinghia sternale avvolgente basta slacciare la fibbia laterale (A) e aprire. Il procedimento inverso deve essere effettuato quando si sistema l'utente di nuovo sul prodotto, assicurandosi di fissare bene le cinghie intorno all'utente. La cinghia di sicurezza, la fibbia di plastica e il bottone automatico dovrebbero essere fissati per far sì che la cinghia non si slacci accidentalmente (A).



Fissare sempre le cinghie di supporto per il torace e le anche (e le cinghie per le ginocchia durante l'utilizzo in posizione supina) prima di effettuare altre regolazioni.



Assicurarsi sempre che le fibbie di plastica siano ben agganciate.

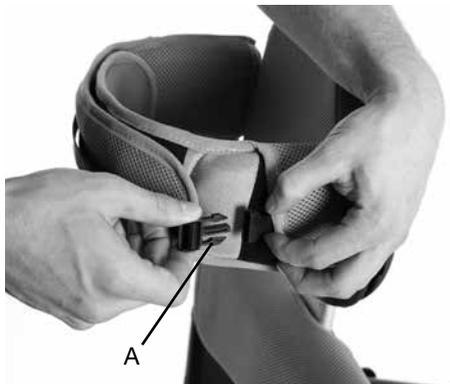

10.7 Regolare il tavolino

Per inserire e regolare la profondità del tavolino, allentare le manopole sul retro di entrambi gli alloggiamenti del tavolino (a), fare scorrere il tavolino fino al raggiungimento della profondità desiderata e serrare nuovamente. Per aumentare ulteriormente la profondità, v. 9.12.

Per regolare l'inclinazione del tavolino, allentare la maniglia di plastica al centro di entrambi gli alloggiamenti del tavolino (B), impostare l'inclinazione del tavolino desiderata e riserrare nuovamente le maniglie di plastica.



Per regolare l'altezza del tavolino, allentare le manopole in cima alla pelotta per le anche (C), regolare gli alloggiamenti all'altezza desiderata e serrare nuovamente, assicurandosi che il tavolino si trovi alla stessa altezza facendo combaciare la scala graduata ai lati delle barre dell'alloggiamento del tavolino.



Non usare mai il tavolino per spingere o guidare la sedia.



Non appoggiare sul tavolino oggetti caldi, dalla temperatura superiore ai 40° gradi.



Notare che il tavolino è pensato per essere utilizzato unicamente dall'utente.



Non appoggiare sul tavolino oggetti pesanti, dal peso superiore agli 8 kg.



11 Informazioni sulla pulizia e sulla manutenzione

Manutenzione

Quando si pulisce il prodotto, si consiglia di utilizzare solo acqua calda e detersivi non abrasivi. Non usare mai solventi organici o liquidi per la pulizia a secco.

Imbottiture e tessuti

1. Le imbottiture e i tessuti possono essere tolti e lavati in lavatrice e asciugati nell'asciugabiancheria selezionando l'impostazione per capi delicati. I rivestimenti standard possono essere lavati a 40° C mentre i rivestimenti anti-infezioni a 90° C. Si prega di rimuovere la schiuma prima di lavare i rivestimenti del poggiatesta, del supporto posteriore e del divaricatore.

Tutti gli altri rivestimenti morbidi possono essere lavati direttamente in lavatrice.

2. Se occorre pulire il rivestimento sul posto, il metodo migliore è strofinare.

3. È consigliato rimuovere le macchie il prima possibile con un panno assorbente, un asciugamano o una spugna. La pulizia ordinaria con una spugna impregnata di acqua e sapone è efficace per lo sporco comune e perdite di scarsa intensità. Fare attenzione a non bagnare eccessivamente il tessuto, altrimenti lo sporco si spargerà ulteriormente.

4. I detersivi antisettici possono essere usati sulle macchie più ostinate. Per queste potrebbe essere utile un solvente sicuro come l'alcol isopropilico o l'olio minerale. Anche mezza tazza di candeggina per 5 litri d'acqua può essere utilizzata come disinfettante efficace.

5. Assicurarsi sempre che il prodotto sia asciutto prima dell'uso.

Componenti in metallo e plastica

1. Per la pulizia quotidiana è possibile utilizzare acqua e sapone o spray battericidi.

2. Per una pulizia più profonda, si può utilizzare un pulitore a vapore a bassa pressione.

3. Non usare solventi per pulire componenti in plastica, legno o metallo.

4. Assicurarsi che il prodotto sia asciutto prima dell'uso.

12 Controllo quotidiano del prodotto

(Terapisti, genitori e assistenti)



Si consiglia a terapeuti, genitori o assistenti di effettuare controlli visivi quotidiani dell'apparecchiatura, per assicurarsi dell'uso sicuro del prodotto. I controlli quotidiani consigliati sono elencati sotto.

1. Tutti i bulloni e le manopole atti alla regolazione devono essere al loro posto e saldi.
2. Verificare che non ci siano segni d'usura nelle imbottiture.
3. Controllare che tutte le ruote si muovano liberamente e che possano essere bloccate in sicurezza.
4. Controllare tutte le strisce in velcro ed eliminare la lanugine per assicurarsi che le cinture si chiudano saldamente.

In caso di dubbi relativi sulla persistenza dell'uso sicuro del vostro prodotto Leckey o nel caso in cui alcune parti dovessero rompersi, si prega di interrompere l'uso del prodotto e contattare il nostro customer service o il vostro rivenditore locale il prima possibile.

14 Distribuzione dei prodotti Leckey

Molti dei prodotti sono valutati e ordinati per soddisfare i bisogni di un singolo utente. Prima di rimettere in circolazione un prodotto si raccomanda al terapeuta prescrivente di verificare la compatibilità delle attrezzature per il nuovo utente e che la rimessa in funzione del prodotto non presenti modifiche o attacchi speciali.

Prima della rimessa in funzione, occorre effettuare un controllo tecnico approfondito da parte di personale tecnico competente. Per l'esecuzione dei controlli richiesti, consultare la Sezione 13.

Assicurarsi che il prodotto sia stato pulito in modo approfondito secondo quanto stabilito dalla sezione 11 del presente manuale.

Assicurarsi che una copia del manuale dell'utente sia fornito con il prodotto. È possibile scaricare il manuale dal sito www.SunriseMedical.it.

Sunrise Medical raccomanda di tenere traccia dei controlli e delle ispezioni effettuati sul prodotto.



In caso di dubbi sull'uso continuato in sicurezza del prodotto o qualora dovesse danneggiarsi una parte, interrompere l'utilizzo del prodotto e contattare immediatamente il servizio clienti o il rivenditore di zona.

15 Assistenza tecnica del prodotto

L'assistenza tecnica di tutti prodotti Leckey dovrebbe essere effettuata solo da personale tecnico competente istruito sull'utilizzo del prodotto.

Per qualunque informazione potete contattare il Servizio Clienti di Sunrise Medical telefonando al numero 0523 573111 o inviando un'e-mail all'indirizzo info@sunrisemedical.it. Potete consultare anche il sito web www.SunriseMedical.it.



Per tutte le altre richieste, è possibile rivolgersi al rivenditore Sunrise Medical più vicino.

Distributore per l'Italia

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it
info@sunrisemedical.it

16 Dati tecnici

Formato	1	2
Età (approssimativa)	4 - 10	8 - 14
	mm	mm
Altezza utente min	1080	1350
max	1450	1750
Peso massimo utente	50kg	60kg
Altezza supporto sternale (da appoggiapiedi a bracciolo) min	760	980
max	1080	1300
Larghezza supporto sternale (distanza tra i supporti laterali) min	160	200
max	280	320
Altezza supporto per le anche (da appoggiapiedi a metà natica) min	460	620
max	730	875
Larghezza supporto per le anche (distanza tra le guide delle anche) min	220	280
max	330	390
Angolo poggiapiedi Flessione plantare	10°	10°
Flessione dorsale	10°	10°
Adattamento massimo contrattura ginocchio	25°	25°
Intervallo altezza tavolino (dalla pelotta per le anche)	0 - 150	0 - 150
Regolazione angolo tavolino Posizione prona	45°	45°
Posizione supina	45°	45°
Peso prodotto	22kgs	25kgs
Intervallo angolazione prodotto Posizione prona	0° to 80°	0° to 80°
Posizione supina	0° to 80°	0° to 80°
Ingombro standing posturale Lunghezza	978	1130
Larghezza	630	650

Codici prodotti e accessori

Code	Standing Posturale Mygo
143-1600	Standing posturale formato 1 – con regolazione manuale angolazione, supporto sternale in PU, pelotta per le anche in PU, supporti per le ginocchia in PU, poggiapiedi in due pezzi.
143-2600	Standing posturale formato 2 – con regolazione manuale angolazione, supporto sternale in PU, pelotta per le anche in PU, supporti per le ginocchia in PU, poggiapiedi in due pezzi.
143-1770-09	Pacchetto rivestimenti formato 1 – rosa (contiene i rivestimenti per supporto sternale, pelotta per le anche e supporti per le ginocchia)
143-1770-08	Pacchetto rivestimenti formato 1 – blu (contiene i rivestimenti per supporto sternale, pelotta per le anche e supporti per le ginocchia)
143-1770-07	Pacchetto rivestimenti formato 1 – arancione (contiene i rivestimenti per supporto sternale, pelotta per le anche e supporti per le ginocchia)
143-2770-09	Pacchetto rivestimenti formato 2 – rosa (contiene i rivestimenti per supporto sternale, pelotta per le anche e supporti per le ginocchia)
143-2770-08	Pacchetto rivestimenti formato 2 – blu (contiene i rivestimenti per supporto sternale, pelotta per le anche e supporti per le ginocchia)
143-2770-07	Pacchetto rivestimenti formato 2 – arancione (contiene i rivestimenti per supporto sternale, pelotta per le anche e supporti per le ginocchia)
143-1638	Supporto per le spalle
143-1768-09	Rivestimento supporto per le spalle – rosa
143-1768-08	Rivestimento supporto per le spalle – blu
143-1768-07	Rivestimento supporto per le spalle – arancione
120-859	Telaio poggiatesta
143-1787	Imbottitura e rivestimento poggiatesta – anti-infezioni (nero)
137-800-05	Imbottitura e rivestimento poggiatesta – anti-infezioni (nero)
137-699-05	Imbottitura e rivestimento poggiatesta (nero) (comprende il telaio)
143-1662	Poggiatesta – anti-infezioni (nero) (comprende il telaio)
143-1619	Solo telaio supporti laterali sternali
143-1675	Telaio supporti laterali ribaltabili (coppia)
143-1673	Supporti laterali complessi verticali – lato destro (singoli con rivestimento)
143-1674	Supporti laterali complessi verticali – lato sinistro (singoli con rivestimento)
143-1780-09	Cinghia avvolgente sterno/anche formato 1 – rosa
143-1780-08	Cinghia avvolgente sterno/anche formato 1 – blu
143-1780-07	Cinghia avvolgente sterno/anche formato 1 – arancione
143-1775-14	Cinghia avvolgente sterno/anche formato 1 – anti-infezioni (nero)
143-2780-09	Cinghia avvolgente sterno/anche formato 2 – rosa
143-2780-08	Cinghia avvolgente sterno/anche formato 2 – blu
143-2780-07	Cinghia avvolgente sterno/anche formato 2 – arancione
143-2775-14	Cinghia avvolgente sterno/anche formato 2 – anti-infezioni (nero)

- 143-3780-09 Cinghia avvolgente sterno/anche formato 3 – rosa
143-3780-08 Cinghia avvolgente sterno/anche formato 3 – blu
143-3780-07 Cinghia avvolgente sterno/anche formato 3 – arancione
143-3775-14 Cinghia avvolgente sterno/anche formato 3 – anti-infezioni (nero)
- 143-1798-09 Cintura per la derotazione prona dell'anca formato 1 – rosa
(comprende il telaio)
143-1798-08 Cintura per la derotazione prona dell'anca formato 1 – blu
(comprende il telaio)
143-1798-07 Cintura per la derotazione prona dell'anca formato 1 – arancione
(comprende il telaio)
143-2798-09 Cintura per la derotazione prona dell'anca formato 2 – rosa
(comprende il telaio)
143-2798-08 Cintura per la derotazione prona dell'anca formato 2 – blu
(comprende il telaio)
143-2798-07 Cintura per la derotazione prona dell'anca formato 2 – arancione
(comprende il telaio)
143-1783-09 Cintura per la derotazione supina dell'anca formato 1 – rosa
(comprende il telaio)
143-1783-08 Cintura per la derotazione supina dell'anca formato 1 – blu
(comprende il telaio)
143-2783-07 Cintura per la derotazione supina dell'anca formato 1 – arancione
(comprende il telaio)
143-2783-09 Cintura per la derotazione supina dell'anca formato 2 – rosa
(comprende il telaio)
143-2783-08 Cintura per la derotazione supina dell'anca formato 2 – blu
(comprende il telaio)
143-2783-07 Cintura per la derotazione supina dell'anca formato 2 – arancione
(comprende il telaio)
- 143-1663 Solo telaio supporti laterali anche (coppia)
143-1690 Staffe di allungamento per le ginocchia
143-1776-09 Cinghie base ginocchia formato 1 – rosa
143-1776-08 Cinghie base ginocchia formato 1 – blu
143-1776-07 Cinghie base ginocchia formato 1 – arancione
143-1776-14 Cinghie base ginocchia formato 1 – anti-infezioni (nero)
143-2776-09 Cinghie base ginocchia formato 2 – rosa
143-2776-08 Cinghie base ginocchia formato 2 – blu
143-2776-07 Cinghie base ginocchia formato 2 – arancione
143-2776-14 Cinghie base ginocchia formato 2 – anti-infezioni (nero)
- 143-1778-09 Cinghie ginocchia con menisco strappato – rosa
– adatte per entrambi i formati
143-1778-08 Cinghie ginocchia con menisco strappato – blu
– adatte per entrambi i formati
143-1778-07 Cinghie ginocchia con menisco strappato – arancione
– adatte per entrambi i formati
- 143-1609 Tavolino standing posturale Mygo formato 1
143-1633 Tavolino standing posturale Mygo senza inserto concavo formato 1

- 143-1610 Tavolino standing posturale Mygo con inserto concavo formato 1
143-2609 Tavolino standing posturale Mygo formato 2
143-2633 Tavolino standing posturale Mygo senza inserto concavo formato 2
143-2610 Tavolino standing posturale Mygo con inserto concavo formato 2
- 143-1624 Supporto posteriore formato 1 e divaricatore (adatto solo per lo standing posturale formato 1)
143-2624 Supporto posteriore formato 2 e divaricatore (adatto solo per lo standing posturale formato 2)
- 143-1790-09 Rivestimento supporto posteriore – rosa
143-1790-08 Rivestimento supporto posteriore – blu
143-1790-07 Rivestimento supporto posteriore – arancione
143-1790-14 Rivestimento supporto posteriore – anti-infezione
143-1792-09 Rivestimento supporto divaricatore – rosa
143-1792-08 Rivestimento supporto divaricatore – blu
143-1792-07 Rivestimento supporto divaricatore – arancione
143-1792-14 Rivestimento supporto divaricatore – anti-infezione
- 152-1600 Sandali formato 1
152-2600 Sandali formato 2
152-3600 Sandali formato 3
- 143-1615 Solleva sandali
- 143-1649 Struttura gioco sospesa





Distributed by



Leckey
Kilwee Business Park
Dunmurry
BT17 0HD
Northern Ireland
United Kingdom
T: 028 9060 2277
F: 028 9060 0795
E: info@leckey.com
W: www.leckey.com/

24 hour postural
care for babies,
kids & adults.
Sleeping, Sitting,
Standing, Walking,
Moving, Bathing,
Toileting.



LS567-04