



EXIGO20

Rullstolen levereras som standard komplett. Det enda du behöver göra är att fälla ut rullstolen och sätta på fotstöden.

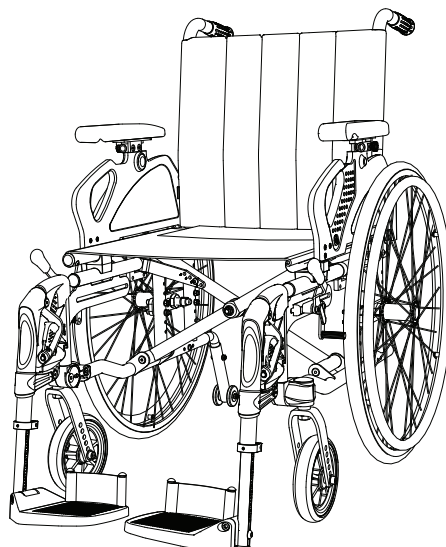

1. För att fälla ut rullstolen, pressa ner sittdelen med dina händer på sitsrören.
OBS! Var försiktig så att du inte får fingrarna i kläm.
2. Lägg sittdynan (tillbehör) på plats och se till att den ligger åt rätt håll.
3. Sätt i benstöden enligt bilden, de kommer att låsas fast automatiskt.

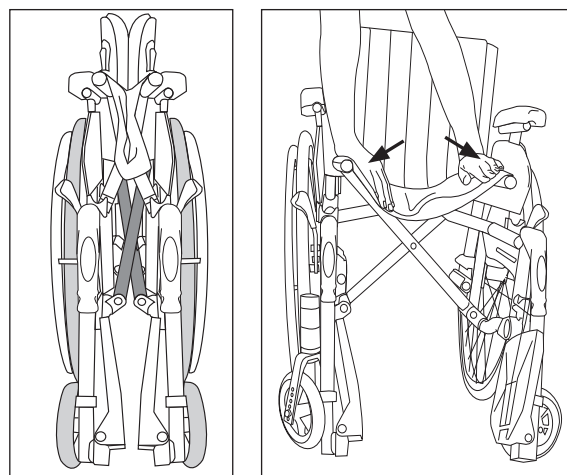

Innan du börjar använda rullstolen:

-  Om du har fler tillbehör så montera dem enligt medföljande monteringsanvisning.
-  Läs bruksanvisningen

