


# MANUELL RULLSTOL

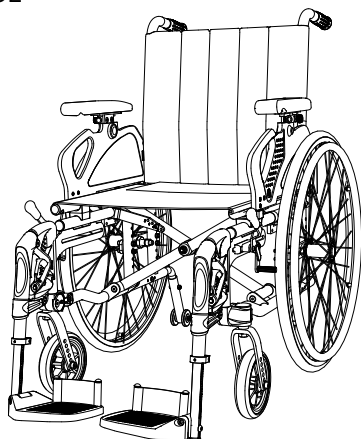


## EXIGO20


Exigo 20

QUICK GUIDE

### När du mottager rullstolen

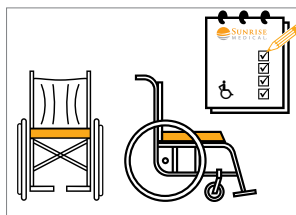


Rullstolen levereras i sittbredder i intervallerna 36-51 cm och sittdjup 39-45 cm. Se till att rullstolen du fått har rätt mått enligt din beställning. Uppgifter om rullstolens dimensioner är markerade på rullstolens ram, under sätet.

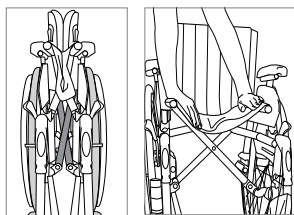


Rullstolen levereras komplett. Det enda du behöver göra är att fälla ut rullstolen och sätta på fotstöden. Du fäller ut rullstolen genom att trycka nedåt med händerna på sitsrören.

**⚠** Ta inte tag i sitsrören, fingrar kan komma i kläm!

Sätt sittdynan (tillbehör) på plats.

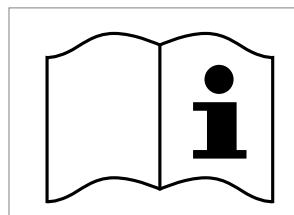


För din egen säkerhet och för att få ut det mesta av funktionerna i din nya rullstol, rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen innan du börjar använda rullstolen.

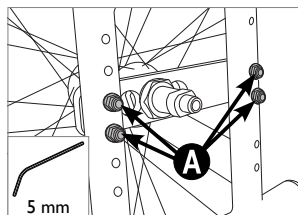

### Bakre sitthöjd

Bakre sitthöjden kan justeras i intervallet 40-50 cm (36-52 cm med byte av delar).

- Ta bort skruvarna **A**
- Flytta hjulblocket uppåt om du önskar lägre sitthöjd
- Flytta hjulblocket nedåt om du ska höja sitthöjden
- Sätt dit skruvarna och dra åt

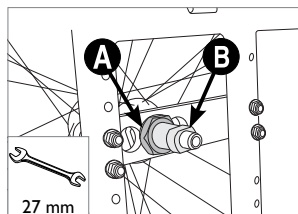


### Ställa in tyngdpunkten (balanspunkt)

Balanspunkten kan justeras i fem olika positioner för att anpassa köregenskaperna till brukaren.

- Lossa fästmuttern **A** på hjulblocket, flytta hylsan **B** till det önskade hålet.
- Sätt dit fästmuttern och dra åt.

Vänd på hjulbasen för att komma åt alla fem positionerna.

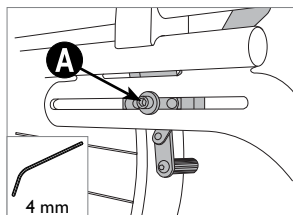

### Justering av bromsarna


Efter justering av sitthöjden bak eller balanspunkten, är det viktigt att kontrollera och/eller justera bromsarna:

- Lossa skruven **A**
- Flytta bromsen längs spåret till den önskade position. Rätt avstånd mellan broms och hjulet är ca 2,5 mm, när bromsen är deaktiverad.

### Främre sitthöjden


Främre sitthöjd är justerbar inom intervallet 42-46,5 cm (36-53 cm vid byte av delar). Främre sitthöjd kan justeras på olika sätt:

- Byt till ett större eller mindre länkhjul
- Byt till kortare eller längre länkhjulsgaffel
- Flytta länkhjulet uppåt eller nedåt i länkhjulsgaffeln (beroende på storleken på länkhjulet och länkhjulsgaffel)

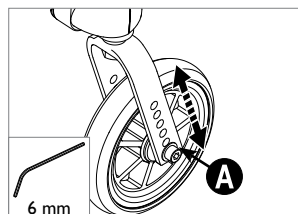

### Flytta till en annan position i länkhjulsgaffeln


- Ta bort skruven **A** i navet på länkhjulsgaffeln
- Flytta hjulet uppåt eller nedåt
- Sätt dit skruven igen.

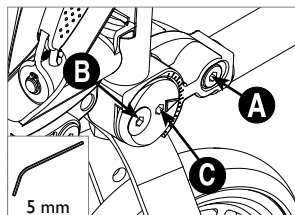


### Vinkel på länkhjulet

Efter justering av sitthöjden, är det viktigt att kontrollera / justera att länkhjulsvinkeln är 90°, för att erhålla bästa körbarhet.

- Lossa skruven **A** något. Lossa skruven **B**.
  - Placera insexnyckeln i kopplingsringen **C** och vrid till önskad vinkel, se skalan.
  - Dra åt skruven **B**.
- Gänglåsningsmedel, såsom Loctite Blue nr 243, kan användas, dra sedan åt skruven **A**

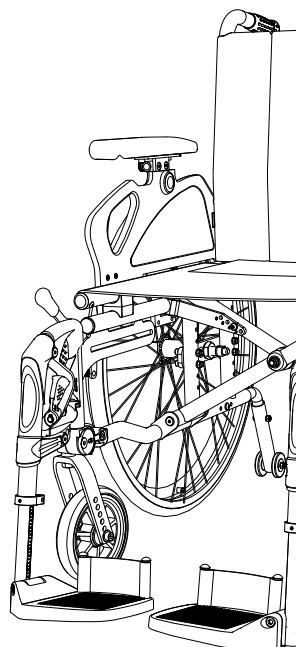

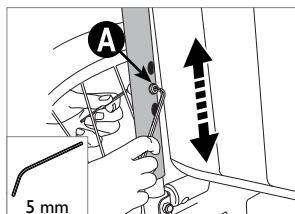


### Rygghöjd

Rygghöjden är inställbar i intervallet 40-44 cm.

- Höjden justeras genom att lossa skruv **A** på båda sidor
- Drag rören till önskad höjd
- Sätt dit skruvarna och dra åt


OBS! Vid justering måste det användas skruvlåsning på skruvarna, t. ex "Blue Loccite No. 253".

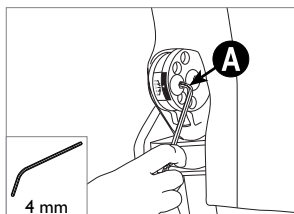

### Ryggvinkel

Ryggvinkeln är justerbar i -5°, 0°, 5°, 10° och 15°. Som standard är ryggvinkeln 5°.



- Ta bort skruven **A**
- Justera ryggen framåt eller bakåt för att uppnå en önskad vinkel. Sätt dit skruven och dra åt
- Se till att samma vinkel ställs in på båda sidor

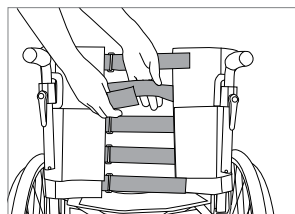

### Ryggkurvatur

En stoppad klädsel ger god komfort.


Fem kardborreband i ryggen kan regleras så rullstolens rygg formar sig för maximalt stöd och komfort. Du kommer åt remmarna genom att lossa ryggklädseln på baksidan av ryggen.

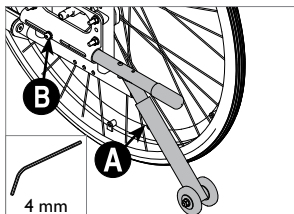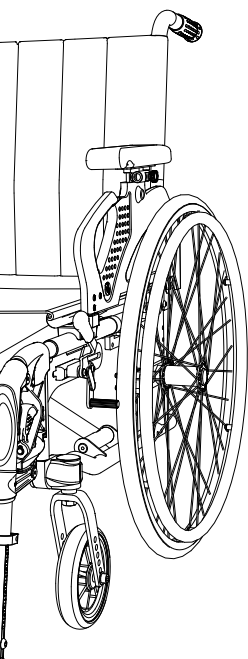

### Justera tipskyddet

Justera tipskyddet när du har ändrat sitthöjd eller balanspunkt i rullstolen.


- Lossa skruvarna **A** och **B**.
- Dra eller skjut tipskyddet till korrekt läge
- Det ska vara max 35 mm från änden på tipskyddet till underlaget.
- Sätt dit skruvarna och dra åt (ditt tipskydd kan se annorlunda ut beroende på val av tipskydd)

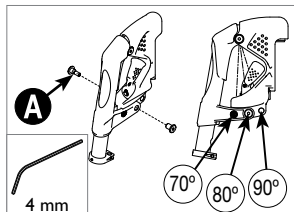

### Benstödsvinkel

För att säkerställa optimal sittställning, kan fotstödet placeras vid 70°, 80° eller 90° vinkel.

- Ta bort skruven **A**
- Dra eller skjut benstödet till önskad vinkel
- Placera skruven i rätt hål och dra åt

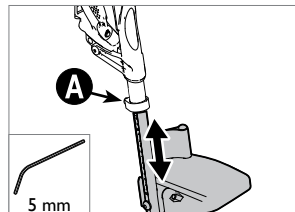


### Benstöd

Längden ner till fotplattan kan justeras steglöst.

- Lossa fästskruven **A** ungefär 5 mm
- Justera benstödet till önskad längd och dra åt skruven
- Använd mätskalan som en guide


## Användning av rullstolen

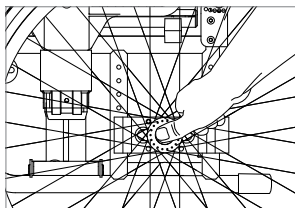

### Quick-release drivhjul


Tryck på knappen i mitten av drivhjulet får att ta bort eller sätta på hjulet.

⚠ Kontrollera att hjulet är ordentligt fastsatt genom att se till att knappen skjuts ut ca 5 mm när hjulbulten är helt inne i drivhjulshylsan.

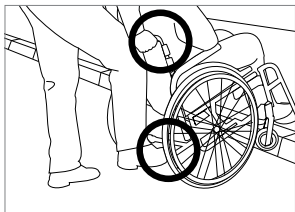

### Komma över hinder

Deaktivera tipskyddet vid trottoarkanter eller liknande. Placera sedan en fot på trampöret medan du styr med körhandtagen.

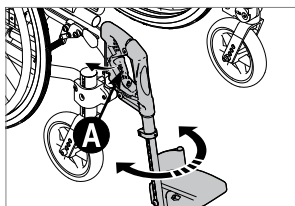


### Benstöd

Benstöden svängs in/ut och är avtagbara för enklare förflyttning till och från rullstolen.

- Benstöd kan frigöras genom att vrida spaken **A** inåt eller utåt.


Benstödet kan lyftas rakt upp och fullständigt avlägsnas om detta är önskvärt. För att sätta tillbaka benstödet igen, gör samma sak i omvänd ordning. Spaken låser automatiskt.

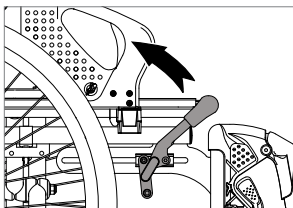

### Bromsar


Dra bromsspaken mot dig för att låsa bromsen.

⚠ Bromsarna är enbart utformade för att hålla stolen när den står stilla. De får inte under några omständigheter användas som färdbromsar. I sådana tillämpningar, rekommenderar vi värdarbroms.

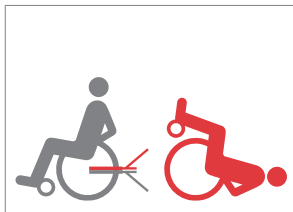

### Tipskyddet


Tipskyddet säkrar rullstolen från att tippa bakåt. Använd alltid tipskyddet när rullstolen används. Kom ihåg att aktivera tipskydd igen när hindret har passerats.

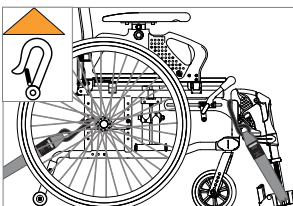

### Kraschtestad

Rullstolen kan användas som passagerarsäte i en bil och har godkänts enligt ISO 7176-19. Rullstolen är märkt med fyra fästpunkter som måste användas vid fastsättning i motorfordon.


📖 Läs mer om säkerhet i bil i rullstolens bruksanvisning.

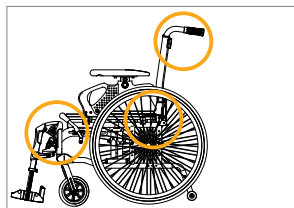

### Lyftpunkter

Om rullstolen lyfts med brukaren sittande i stolen, skall rekommenderade lyftpunkter användas.

⚠ Se till att körhandtagen är låsta innan du lyfter.

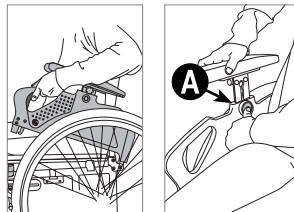

### Armstöd

Vid till exempel, sidoförflyttning kan armstödet svängas helt tillbaka. När armstödet svängs hela vägen tillbaka kan det avlägsnas genom att lyftas rakt upp.

### Armstöd - höjd

För optimalt stöd av armarna, reglera armstöden i höjd - utan användning av verktyg

- Tryck på utlösningsspaken **A** och dra armstödsplattan till önskad höjd.



Sunrise Medical AB

Neogatan 5

431 51 Mölndal

Tel: 031-748 37 00

E: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)

[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)