



**JAY PUDER
& RYGGE**

JAY PUDER & RYGGE

Tryksårsforebyggelse og stabilitet

Forebyggelse af tryksår	4
Reduktion af fugt og varme / Reduktion af tryk	5
Stabilitet	6
Siddestilling og stillingskorrigerende / Siddetolerance	7
Hvordan vælger jeg imellem luft og fluid? / Valg af pudefront kontur	8
Betræk	9

Trykfordelende puder

Basic	Komfort	10
Easy Visco	Høj komfort og enkel positionering - lav til middel risiko for tryksår	11
Zip	Komfortabel og konturformet pude, specialudviklet til børn	12
Lite	Designet til den aktive bruger, som ønsker minimal vægt	13

Trykaflastende puder

Xtreme Active	Trykaflastning med stabilitet og let positionering	14
Balance	Perfekt balance mellem trykaflastning og positionering	15-18
Balance Cryo® Fluid	Kølig trykaflastning, som reducerer fugt og shear	19
J2	Stabilitet og positionering med høj trykaflastning	21
J2 DC	Stabilitet og positionering ved meget høj risiko for tryksår	22
GS	Vokser med barnet og giver stabilitet, positionering og trykaflastning	24

Tilpasninger & Rengøring af puder

Tilpasninger af Balance, J2, J2 DC og GS	25
Rengøringsvejledning af JAY puder	26

JAY Rygge - indholdfortegnelse & introduktion

J3	Den mest alsidige JAY ryg og støtte til den aktive bruger	30-39
Zip	Let, alsidig, designet til børn	40-41
Fit	Modulær, justerbar konturryg designet til børn/ unge voksne	42-43
JAY Fit 2U	Multi-dimensionel støtte til børn med komplekse udfordringer	44-45

Oversigt over JAY puder

Trykfordelende

Basic



Easy Visco



Lite



Zip



Trykaflastende

Xtreme Active



J2



GS




J2 DC



Balance



PUDER

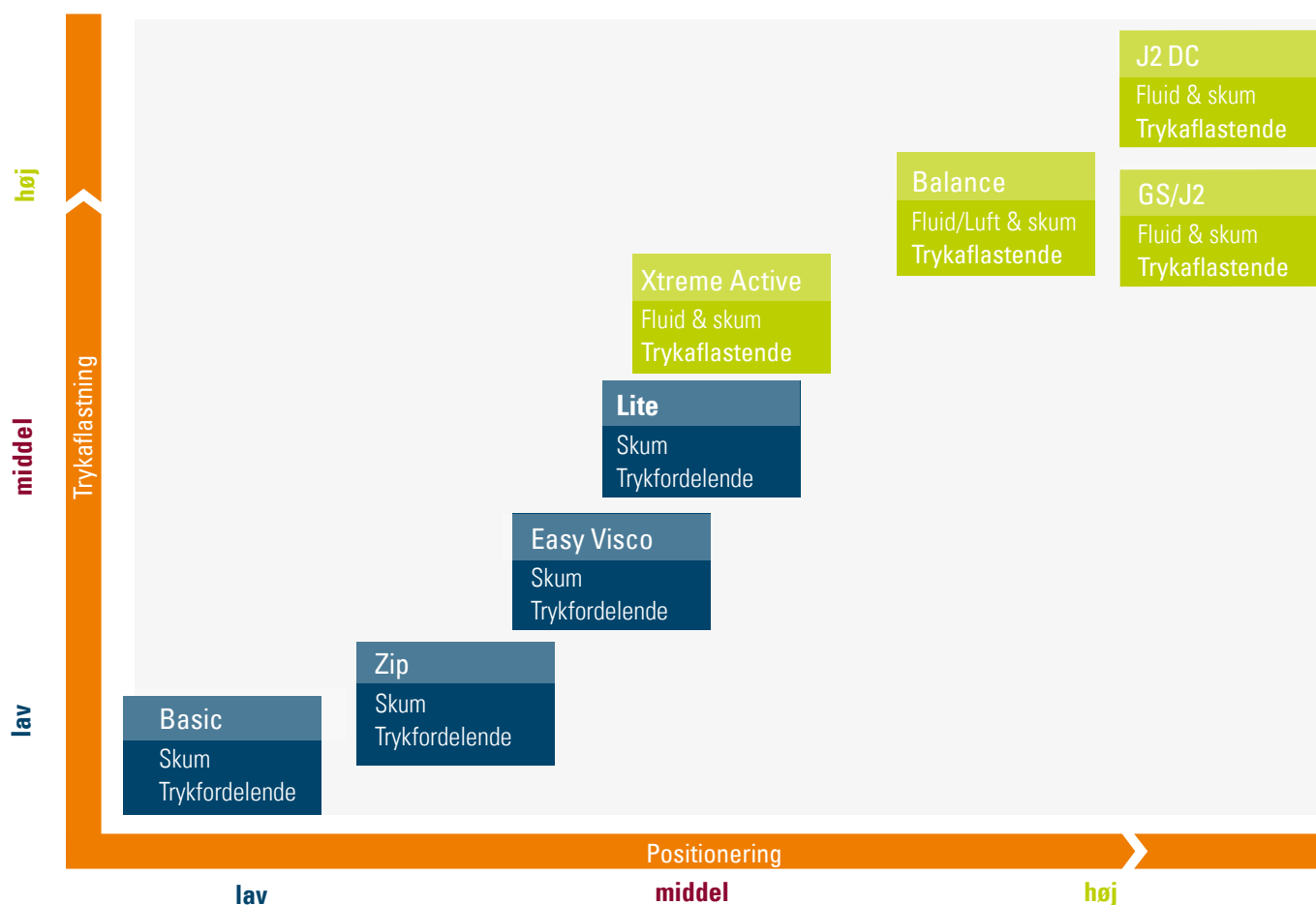

Tryksårsforebyggelse og stabilitet

Forebyggelse af tryksår


Principper for trykfordeling og trykaflastning, materialeegenskaber og brugers behov.

Tryksår forebygges ved at;


- brugerens vægt fordeles på størst mulig sideflade
- minimere trykket på kritiske områder (f.eks. sædekuder)
- give spidse knogler god trykaflastning
- reducere fejlstilling

Statiske puder/faste materialer som skum, viscoelastisk skum og gele (OBS gele er ikke det samme som fluid!);

- tilpasser sig/former sig efter brugerens anatomi i varierende grad, afhængig af materialet
- kan give god trykfordeling, men vil altid give et modtryk mod huden
- giver et tilsvarende større modtryk, jo dybere bækkenet presser ned i materialet
- kan give punkttryk på kritiske områder

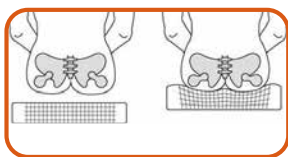


Statisk pude

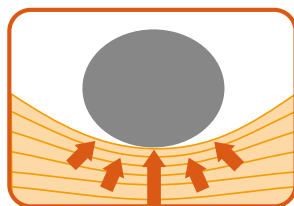


Dynamiske puder/flydende materialer som fluid og luft

- former sig helt efter brugerens anatomiske form, uden modtryk
- fordeler trykket helt jævnt

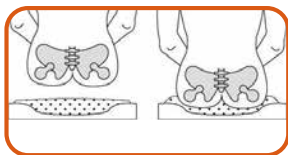

Dynamisk pude

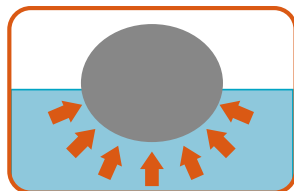

Overfladespænding - alle materialer som benyttes i trykaflastende siddepuder har en overflade.

- Faste materialer har overfladespænding
- Når væsker og luft "kapsles ind" med en så stor overflade at den kan forme sig rundt om brugerens sædeparti, skabes lille eller ingen overfladespænding

Sørg for, at puden er tilstrækkelig høj

- Puderne har forskellige højder (fra 5 – 13 cm). Nogle brugere er tyndere og har mere fremtrædende sædekuder end andre. De har derfor behov for en højere pude, for at opnå god trykaflastning
- Puden skal vælges og tilpasses, så sædekuderne kan synke helt ned i puden, og der skal altid være aflastende materiale under dem

Vælg pude med det materiale som giver brugeren god tryksårsforebyggelse, dvs;

- fluid og luft, når brugeren har middel til høj risiko for at udvikle tryksår
- skum, viscoelastisk skum og gelé, når brugeren har lav til middel risiko for at udvikle tryksår

De trykaflastende egenskaber i fluid og luft er i sig selv ikke tilstrækkelige til at forhindre tryksår. Pudens opbygning skal sikre en stabil, anatomisk støtteflade for bækken og lår. Dette begrænser faren for punkttryk og friktion

Tryksårsforebyggelse og stabilitet

Reduktion af fugt og varme

Nogle brugere er mere sensible og i risiko for at udvikle tryksår end andre. God trykaflastning kræver, at fremtrædende knoglefremspring kan synke ned i puden, men det kan til gengæld øge temperaturen og dermed også fugtigheden.

Fugt kan reduceres, men ikke elimineres ved brug af specialbetræk. Det er derfor vigtigt altid at lave opfølgning - især på de brugere, som bliver varme og fugtige.

- Skum og gele er varmeisolerende (har høj termisk masse), og holder dermed på varmen
- Væsker og luft leder og afleder varme til en vis grad
- JAY fluid afleder varmen til en vis grad (har middel termisk masse)
- Luft afleder varme mere effektivt (har lav termisk masse)

Pudens materiale og design er vigtig:

- Gummi og neoprenbetræk hindrer fugt i at forsvinde
- Specialbetræk reducerer fugt
- Brugerens beklædning er vigtig; f.eks. er bomuld dårlig til at lede både fugt og varme

Beklædning og inkontinens har større indvirkning på fugtproblematik end selve pudens materiale. Vægtskifte er kritisk mht. at bortlede varme og reducere tryk:

- Aktive brugere skal lære at vægtskifte (mikrobevægelser anbefales)
- Passive brugere kan ikke selv klare vægtskifte og må have hjælp


Reduktion af tryk

Tryk er lodrette kræfter i vævet; vægt pr. siddefladeareal. Shear (gnidningsmodstand) er horisontale kræfter i vævet. Udsættes hud for hårdt tryk i kombination med shear over tid, kan det have en kritisk effekt på celler.

Shear opstår, når brugeren sidder med bagdelen ned og frem i kørestolen (bagudklippet bækken). Denne forskydning af væv og hud i forhold til hinanden øger faren for tryksår.

- Skum, viscoelastisk skum og gele komprimeres af lodrette og horisontale kræfter, hvilket giver betydeligt shear (Figur 1)
- Væsker (f.eks. fluid) og luft former sig om bagdelen og bevæger sig med brugeren, hvilket giver minimalt shear (Figur 2)

Friktion opstår mellem hudoverflade og underlag. Høj friktion kan give overfladetryksår. Det er dermed vigtigt at anvende en siddepude, som reducerer shear og giver stabilitet i både bækkenet og overkroppen.

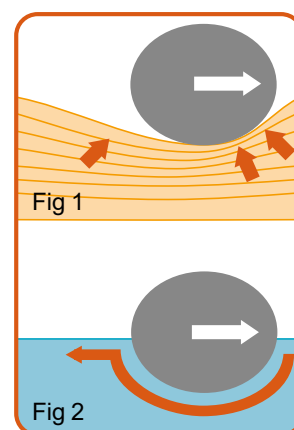

Tryksårsforebyggelse og stabilitet

Stabilitet

En vigtig faktor i forhold til tryksårsforebyggelse er stabilitet. Pudens skal være stabil, for at kunne fordele trykket effektivt. Stabilisering af bækkenet er afgørende! Pudens form og konsistens vil påvirke dette.

Puden skal være tilpasset bækkenets anatomi og ikke omvendt.



Set fra siden, sagittalplanet:

Puden stabiliserer bækkenet i sagittalplanet. Sædebrønden begrænser, at sædekuderne roterer forover. Pudens anatomiske form giver god, jævn trykfordeling.

En anatomisk udformet pude er tilpasset bækkenets anatomi i både sagittal- og frontalplanet, for at give optimal trykfordeling og stabilitet.



Set bagfra, frontalplanet:

Puden stabiliserer bækkenet sideværts, og pudens anatomiske form giver god, jævn trykfordeling.

Stabilisering ved bagudklippet bækken.

Bækkenet har en tendens til at rotere bagover; det betyder at sædekuderne glider fremad og der dannes shear og instabilitet. Pudens anatomiske form og konsistens vil kunne begrænse dette.

En yderligere stabilisering af bækkenet kan opnås ved at anvende en stabil rygstøtte (se JAY rygge på side 29-45).

Stabilisering ved fejlstilling af bækkenet sidevejs.

Pudens anatomiske form og konsistens vil kunne give god stabilisering af trochanter og således begrænse fejlstillingen.

Trykafastende siddepuder bør både kunne trykafaste og stabilisere.

Tryksårsforebyggelse og stabilitet


Siddestilling og stillingskorrigering

Stabil siddestilling tilpasses i kombination med valg af pude, rygsystem og kørestol. Gennemsnitlig 30% af kørestolsbrugerne har behov for tilpasning af siddestillingen pga. fejlstillinger, og stillingskorrektion er derfor nødvendig.

Har brugeren fejlstilling gælder følgende regel for tilpasning:

- Er fejlstillingen fleksibel/bevægelig kan den korrigeres
- Er fejlstillingen fikseret/stiv, må siddeenheden tilpasses til denne stilling

Stillingskorregerende og stabiliserende siddepuder har en fastere base end puder som "bare" er trykafastende eller "bare" skal give komfort.

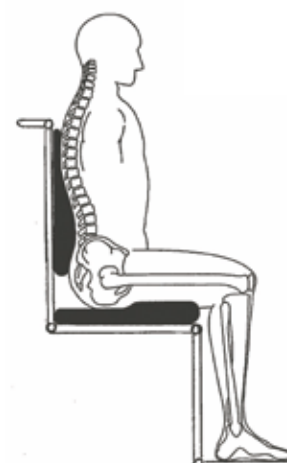

Stabilitet

Hvis brugeren mangler indvendig stabilitet, må denne erstattes af udvendig stabilitet.

Udvendig stabilitet = siddesystem.

- Puden skal stabilisere bækkenet fra undersiden
- Ryggen skal stabilisere bækkenet og overkroppen bagfra og sideværts

Siddetolerance

Vi ved, at tryk og shear over tid er kritisk. Vi ved, at komfort opleves forskelligt. Fagpersoner har ansvaret for, at der sørges for tryksårsforebyggende tiltag for alle, som er i farezonen for at udvikle tryksår.

Det er vigtigt at sidde oprejst for at reducere farerne ved immobilitet; det gør det enklere at spise, trække vejret og fremmer rehabilitering. Generelt er det vigtigt for almentilstanden at sidde op, men der bør lægges vægt på at undgå eller begrænse tryk på udsatte områder. Brug af egnede puder sammen med positioneringsteknikker og evt. tidsregimer - dvs. i forhold til tiden som man er siddende i en bestemt stilling - er aktuelle tiltag.

Ydre faktorer, som øger risikoen for tryksår:

- Tryk, shear, friktion, hårdt underlag, varme, fugt

Indre faktorer, som øger risikoen for tryksår:

- Nedsat bevægelighed og andre faktorer såsom ernæring, alder, inkontinens, blodcirkulation, vægtforandring, sensibilitet og blodtryk

Tryksårsforebyggelse og stabilitet

Hvordan vælger jeg mellem luft og JAY fluid?

Det er et spørgsmål mange stiller. Generelt vil vi råde dig til følgende:

JAY puder med luft;

- kan vælges til brugere, som selv kan tilpasse korrekt luftmængde, evt. med hjælp fra plejepersonale. Regelmæssig kontrol af korrekt luftmængde er påkrævet.
- benyttes til brugere med specielle ønsker eller behov for luftindlæg.
- er lidt lettere i vægt.

JAY puder med fluid;

- kan vælges af de fleste. Denne fluid er selvjusterende og tilpasser sig brugeren. Den er enkel at tilpasse og meget brugervenlig, hvilket gør den til et trygt valg. Puder med fluidindlæg er vedligeholdelsesfrie i daglig brug.
- giver god stabilitet.

Valg af pudens kontur

En pude med flad kontur er meget vigtig for den aktive bruger:



(JAY Balance kontur)



(JAY Xtreme Active kontur)

JAY Xtreme Active og JAY Balance har en flad front, som sikrer en stabil forflytning. Begge puder har også en blødhed, som gør dem velegnet for brugere, som gerne vil flytte sig frem på puden. Det kan f.eks. være i forbindelse med at tage tøj på. Dette giver stor bevægelsesfrihed og en trykstillingsændring.

En pude med kontur stabiliserer lårene

Puderne har kontur med integreret adduktion og abduktion, som giver meget god støtte af lårene. Denne pude er designet til brugere, som ikke aktivt skal forflytte sig ind og ud af kørestolen ved hjælp af en sideværts forflytning.




(JAY Easy Visco pudefront)

Tryksårsforebyggelse og stabilitet

Betræk

Luftcirkulerende (Mikroklimatisk)

JAYs luftcirkulerende betræk er lavet af 3DX™ "spændstig net-agtig skum", som afleder varme og fugtighed fra kroppen (Mikroklimatisk), hvilket er yderst vigtigt, da varme og fugtighed kan være med til at skade huden.

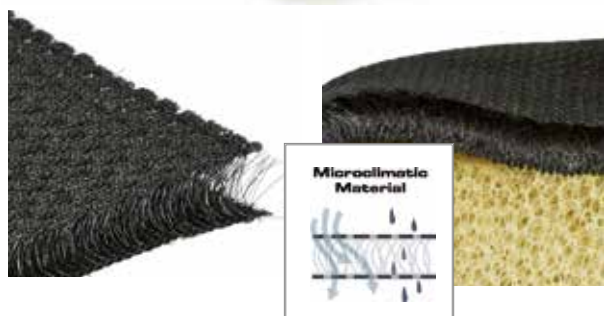

Strækbart

Hvis man ønsker et glattere betræk, er det strækbare betræk et godt alternativ.



Inkontinens

Hvis permanent inkontinens er et problem, kan et inkontinensbetræk være en god løsning.



Vaskeanvisning

Luftcirkulerende og strækbart - maskinvask 70°C
Inkontinens - maskinvask 60°C

Alternativt: Alle betræk kan vaskes på 80°C i 10 min. samt tørretumbles (bakteriedræbende). Se komplet vaskeanvisning på side 26.

Bemærk

Muligheder for typen af betræk afhænger af valget af puden. Se venligst i oversigten nederst under hver pude.

JAY Basic

Komfort

Produktegenskaber:

- Pudens består af en anatomisk formet skumkerne med en god bæreevne
- Pudens underside har skråtskårrede kanter, således at den passer i alle kørestole, med både hængekøje- og plansæde
- Inkontinensbetræk med anti-slip og velcro som standard

Klinisk anvendelse:

- Risikogruppe: Brugere med lav risiko for tryksår og shear
- Brugere som ønsker komfort med minimal positionering
- Brugere som kan udføre selvstændig vægtoverføring
- Brugere som ikke sidder i kørestolen flere timer ad gangen



Størrelser														
Dybde	Bredde													
cm	25	30	35	36	38	40	42	44	46	48	50	52	56	60
25														
30														
35														
36														
40														
42														
44														
46														
48														
50														
56														
60														

■ Den blå markering indikerer i hvilke størrelser puden findes samt muligheder for betræktyper

Højde (i cm)	Højeste punkt
5	6,3



Pudens vægt i 40x40	0,7 kg
Maks. brugervægt	150 kg
Garanti	2 år

Luftcirkulationsbetræk	
Inkontinensbetræk*	
Strækbart betræk	

- *Standardbetræk
- Varenummer og HMI-nr. - se venligst separat oversigt på www.sunrisemedical.dk
- Leveringstiden kan variere afhængig af pudens størrelse. Kontakt venligst kundeservice for at høre mere om leveringstiden på et specifikt produkt.

JAY Easy Visco

Høj komfort og enkel positionering

Produktegenskaber:

- Let skumbase, som er konturformet for at yde medial/lateral støtte
- Blødt, visco-elastisk skum i sædebrønden og fast, konturformet skum under lårdelen. Nedsynkning i sædebrønden aflaster sædekuderne og fordeler trykket frem under lårene
- Udskæring ved halebenet for øget aflastning til et udsat område
- Buet bund for anvendelse i hængekøjesæde. Pudsen ligger dermed stabilt og bliver ikke unødvendig høj
- Inkontinensbetræk som standard, luftcirkulationsbetræk som tilkøb

Klinisk anvendelse:

- Risikogruppe: Brugere med lav til moderat risiko for tryksår og lav risiko for shear
- Brugere med let symmetrisk eller asymmetrisk holdning og behov for moderat positionering
- Giver moderat lateral stabilitet samt moderat fremad/bagud stabilitet
- Brugere som kan udføre selvstændig vægtoverføring
- Brugere som har behov for en stabil og komfortabel pude



Dybde	Størrelser											
	Bredde											
cm	25	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
25												
30												
35												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
56												
60												

Den blå markering indikerer i hvilke størrelser pudsen findes samt muligheder for betræktyper

Højde (i cm)	Højeste punkt
6,3	8,0



Pudens vægt i 40x40	1,06 kg
Maks. brugervægt	150 kg
Garanti	2 år

Luftcirkulationsbetræk	
Inkontinensbetræk*	
Strækbart betræk	

- *Standardbetræk
- Varenummer og HMI-nr. - se venligst separat oversigt på www.sunrisemedical.dk
- Leveringstiden kan variere afhængig af pudens størrelse. Kontakt venligst kundeservice for at høre mere om leveringstiden på et specifikt produkt

JAY Zip

Komfortabel og konturformet pude, specialudviklet til børn

Produktegenskaber:

- Anatomisk formet 2-lags skummateriale for let positionering
- Blødt og strækbart betræk med antimikrobiel effekt (Xstatic™ teknologi) og som samtidigt er mikroklimatisk grundet et ekstra lag nederunder, som hjælper med luftcirkulationen (3DX™ Spacer Fabric)
- Findes i farvekombinationerne: Sort/sort, sort/blå og sort/lyserød (sort/sort er standard)
- Strækbart vandafvisende inderbetræk som er nemt at tørre af



Klinisk anvendelse:

- Risikogruppe: Børn med lav til moderat risiko for shear
- JAY Zip puden er udviklet ved brug af antropometriske data således, at størrelserne kan imødekomme børns unikke behov
- Giver moderat lateral stabilitet samt moderat fremad/bagud stabilitet
- Brugere som kan udføre selvstændig vægtoverføring



(JAY Zip ryg s.40-41)



JAY Zip puden passer med JAY Zip ryggen. Tilsammen udgør de et komplet børnesiddesystem.

Dybde	Størrelser											
	Bredde											
cm	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
20												
22												
24												
26												
28												
30												
32												
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												

Den blå markering indikerer i hvilke størrelser puden findes samt muligheder for betræktyper

Højde (i cm)	Højeste punkt
5	6

Pudens vægt i 30x30cm	0.9 kg
Maks. brugervægt	75 kg
Garanti	2 år



JAY Zip puden har et specielt betræk, som beskrevet under produkttegenskaber.

- *Betrækket fåes i farverne: Sort/sort, sort/blå og sort/lyserød
- Varenummer og HMI-nr. - se venligst separat oversigt på www.sunrisemedical.dk
- Leveringstiden kan variere afhængig af pudens størrelse. Kontakt venligst kundeservice for at høre mere om leveringstiden på et specifikt produkt.

JAY Lite

Designet til den aktive bruger, som ønsker minimal vægt

Produktegenskaber:

- Fast, ekstremt let, åndbar skumbase med udkæring for at give plads til sædekuder
- Udemærket lateral og fremad/bagud stabilitet opnås via en kombination af Optiwell™ teknologi og de forskellige lag i basen - bækkenet passer i sædebrønden
- Optiwell™ teknologien, udkæringen til sædekuderne og skummet i sædebrønden fordeler effektivt trykket væk fra fremtrædende knoglefremspring. Skumindlægget i sædebrønden kan tages af og vaskes eller udskiftes
- Pudens vejer fra kun 660 gram og er derfor et perfekt valg til de mange letvægtskørestole på markedet
- Mikroklimatisk luftcirkulationsbetræk 3DX™ for varme og fugtafledning er standard



Klinisk anvendelse:

- Risikogruppe: Moderat risiko for tryksår
- Brugere som behøver let moderat lateral og fremad/bagud stabilitet
- Symmetriske brugere, som behøver komfort og en let pude med let/moderat positionering
- Brugere, som kan udføre selvstændig vægtoverføring
- Behov for varme og fugtafledning




Dybde	Størrelser							
	Bredde							
cm	35	38	40	42	44	46	48	50
35								
38								
40								
42								
44								
46								
50								

■ Den blå markering indikerer i hvilke størrelser puden findes samt muligheder for betræktyper

Højde (i cm)	Højeste punkt
8	9,5

Pudens vægt i 40x40cm	0,7 kg
Maks. brugervægt	150 kg
Garanti	2 år

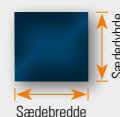

Luftcirkulationsbetræk*	
Inkontinensbetræk	
Strækbart betræk	

- *Standardbetræk
- Varenummer og HMI-nr. - se venligst separat oversigt på www.sunrisemedical.dk
- Leveringstiden kan variere afhængig af pudens størrelse. Kontakt venligst kundeservice for at høre mere om leveringstiden på et specifikt produkt.

JAY Xtreme Active

Trykaflastning med stabilitet og let positionering



Produktegenskaber:

- Let skumbase med blød og smidig sædebrønd
- JAY Fluidindlæg for bedste trykaflastning og for reducere af shear for den aktive bruger
- To størrelser JAY Fluid: Standard-versionen (3-kamre) benyttes til de fleste, mens Large-versionen (to-kamre) benyttes til de tyndeste brugere, som behøver ekstra masse for at opnå optimal trykaflastning. Skumbasen er tilpasset til den valgte fluid-størrelse.
- Luftcirkulationsbetræk og inderbetræk som standard. Inkontinensbetræk og strækbart betræk kan tilkøbes
- Ekstra positioneringsdele (aftagelige, placeres med velcro på det indvendige betræk) for bedre positionering af ben (bemærk at dette er et tilkøb)



Klinisk anvendelse:


- Risikogruppe: Aktive brugere med moderat til høj risiko for tryksår og shear
- Brugere som har behov for en pude med lav vægt og højde for optimal aktivitet
- Brugere med let symmetrisk eller asymmetrisk holdning og behov for moderat positionering
- Brugere som kan udføre selvstændig vægtoverføring og forflytning



Dybde	Størrelser									
	Bredde									
cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
34										
36										
38										
40										
42										
44										
46										
48										
50										

■ Den grønne markering indikerer i hvilke størrelser puden findes samt muligheder for betræktyper

Højde (i cm)	Højeste punkt
5	9

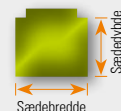

Pudens vægt i 40x40cm	1,7 kg
Maks. brugervægt	150kg
Garanti	2 år

Luftcirkulationsbetræk*	
Inkontinensbetræk	
Strækbart betræk	

- *Standardbetræk
- Varenummer og HMI-nr. - se venligst separat oversigt på www.sunrisemedical.dk
- Leveringstiden kan variere afhængig af pudens størrelse. Kontakt venligst kundeservice for at høre mere om leveringstiden på et specifikt produkt

JAY Balance

Den perfekte balance mellem trykaflastning og stabilitet


Optimeret for trykaflastning, stabilitet og komfort

Produktegenskaber:

- Tykt, blødt konturformet skum i det øverste lag støtter under trochanter og lår. Giver ekstra beskyttelse af sædekuderne i situationer, hvor der er større tryk på forkanten af sædebrønden
- JAY Balance fås med JAY Fluid, Cryo Fluid eller med luftindlæg
- Sædebrøndens udformning med lukket bagkant forhindrer Fluid-indlægget i at flytte sig
- Pudens underside har skråtskårede kanter, således at den passer i alle kørestole, med både hængekøje- og plansæde
- Skumbasen er beskyttet af et inderbetræk. Yderbetrækket er som standard vores mikroklimatiske, luftcirkulerende betræk. Inkontinensbetræk eller strækbart betræk kan tilkøbes

Klinisk anvendelse:

- Risikogruppe: Brugere med høj risiko for tryksår og shear
- Passer til brugere, som har behov for omslutning og nedsynkning af bækken og sædekuder
- Anvendes med fordel til brugere som er ude af stand til at forflytte sig og udføre selvstændig vægtoverføring

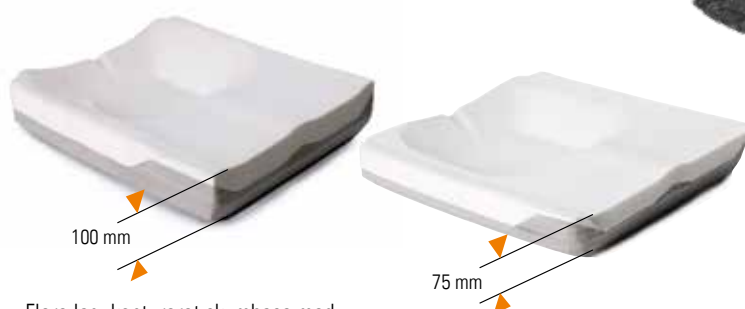

Flere lag, kontureret skumbase med sædebrønd, fås i to højder




Størrelser													
Dybde	Bredde												
cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60		
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
56													
60													
PLA	A			B						C			

 Den grønne markering indikerer i hvilke størrelser puden findes samt muligheder for betræktyper

Højde (i cm)
7,5 / 10,0

Bemærk: JAY Balance med Cryo Fluid fås kun fra 360 mm i bredden og 360 mm i dybden. Se ordreformular for ændringer

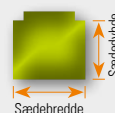

Pudens vægt 40x46cm	2,4 kg fluidindlæg 3,0 kg Cryo Fluidindlæg 1,9 kg luftindlæg
Maks. brugervægt	150 kg (bredde 34-50cm) 225 kg (bredde 56-60cm)
Garanti	2 år

Luftcirkulationsbetræk*	
Inkontinensbetræk	
Strækbart betræk	

- *Standardbetræk
- Leveringstiden kan variere afhængig af pudens størrelse. Kontakt venligst kundeservice for at høre mere om leveringstiden på et specifikt produkt
- Puderne kan bestilles i specialmål. Kontakt kundeservice for at høre mere

JAY Balance

Den perfekte balance mellem trykaflastning og stabilitet



JAY Fluid™ eller luftindlæg

JAY Balance kan bestilles med Cryo Fluid, JAY Fluid- eller luftindlæg, som tilpasser sig brugeren og sikrer trykaflastning under fremtrædende knoglefremspring. Indlæggene kan bruges til at korrigere eller støtte op om fejlstilling af bækkenet.

Derudover køler Cryo Fluid aktivt brugerens siddende hudoverflade i op til 8 timer.



CRYO FLUID



Positioneringskiler med som standard

Med positioneringskiler - der kommer med som standard - kan bækken og lår positioneres optimalt for bedste siddestilling.

Innovativt dobbelt betræksystem

Inderbetrækket er 2-vejs strækbart i materialet Dartex. Det er vandafvisende og nemt at rengøre. Den vandtætte lynlås sikrer, at skumbasen forbliver tør.

Det luftcirkulerende yderbetræk (Mikroklimatisk) afleder fugt og varme for optimeret beskyttelse af huden. Der findes også inkontinensbetræk samt et strækbart betræk, som tillader større nedsynkning af bækkenet for mere trykaflastning. De kan alle komme i vaskemaskinen ved 60 grader. Begge betræk kan tilkøbes.



JAY Balance

Klinisk design og fordele

Sædebrønden har fået et nyt og forbedret design

Størrelsen på sædebrønden passer til bækkenets antropometriske mål, uafhængig af pudens bredde. Sædebrønden er tilpasset bækkenet og vil derfor passe optimalt til brugeren ved valg af korrekt pude bredde.

Klinisk design

Sædebrøndens udformning sikrer optimal trykfordeling og lateral stabilitet. Sædekuderne får optimal aflastning, når de synker ned i fluid- eller luftindlægget, og trykket fordeles til trochanter og lårben via sædebrøndens PLA (Pelvic Loading Area) design til pudens stabile base.



Kliniske fordele:

- Sikrer at brugeren har tilstrækkelig trykaflastende materiale under sædekuderne
- Det bløde skum bag i sædebrønden, holder, fluid indlægget på plads rundt om bækkenet
- Giver god lateral stabilitet, som reducerer risikoen for fejlstilling og tryksår
- Fluidstørrelsen er tilpasset pudens størrelse

Blødt skumlag

Det bløde skum foran i sædebrønden kombinerer stabilitet med ekstrem komfort.

- Den bløde skumoverdel giver komfortabel støtte til trochanter og lårben
- Det tykke, bløde skum i sædebrøndens forkant giver ekstra beskyttelse af sædekuderne og en komfortabel siddestilling

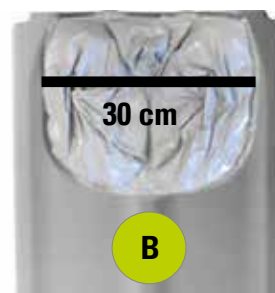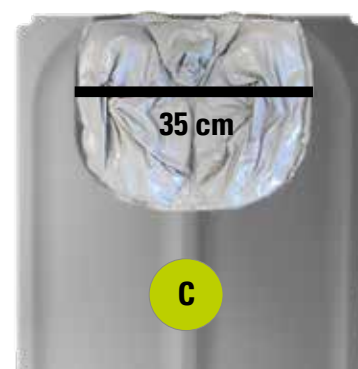

JAY Balance

Optimal trykfordeling med forskellige indlæg og kamre

JAY Fluid™ indlæg

Fluid-indlægget er rekonstrueret med udgangspunkt i ny klinisk og praktisk videnskab.

Indlægget;

- er lettere
- har forbedret trykfordeling
- giver øget stabilitet
- er letanvendelig, dvs. kræver minimal vedligeholdelse

Fluidindlægget er dynamisk og selvjusterende. Det former sig automatisk rundt om brugerens bækkenparti og bevæger sig med brugeren.



Opdeling i 3 kamre

Kamrene sikrer optimal trykaflastning ved, at fluiden automatisk tilpasser sig brugerens form og position. Fluidindlæggets øgede overflade reducerer overfladespændingen og dermed reduceres risikoen for friktion.

Standard fluidindlægget kan ved behov overfyldes, underfyldes eller fyldes asymmetrisk fra fabrikken (OBS denne service er dog en specialbestilling og dermed et tilkøb. Kontakt kundeservice for pris og levering).

Luftindlæg - 2 kamre (Air Dual)

- Luftindlægget giver mulighed for tilpasning af korrekt luftmængde i hvert kammer separat, f.eks. for at korrigere eller kompensere for et skævt bækken
- Indlægget kan tilpasses varierende behov
- JAY Balance basen giver fortsat støtte til trochanter, hvilket bidrager til en stabil siddende stilling

Tilpasning af luftmængden

Luftmængden justeres ved brug af håndpumpen. Du får let adgang til slangerne ved hjælp af ventilerne på pudens front.

Bemærk

Håndpumpe og reparationsudstyr leveres med puden.

Luftmængden bør kontrolleres dagligt. Se instruktioner i brugsanvisningen.



JAY Balance Cryo® Fluid

CRYO FLUID

JAY Balance med CRYO® Fluid

JAY Balance pudens gennemtestede design fås nu også med den revolutionerende Cryo Fluid. Skab din egen JAY Balance pude, der passer til dine behov. Vælg mellem forskellige indsatse, positioneringsdele & betræk, og få det højeste hudbeskyttelsesniveau med maksimal stabilitet og komfort.



Hvordan Cryo® Fluid arbejder




Varme efterlader hudens overflade kølig

Cryo Fluid har millioner af mikroperler fyldt med parafin voks, der smelter ved en bestemt temperatur. Da hudtemperaturen er varmere end cryo væskens omgivende temperatur, overføres varme fra huden aktivt til væsken. Dette resulterer i en sænkning af hudtemperaturen på det siddende område.



En langvarig effekt

Ud over de millioner af mikroperler, anvender Cryo Fluid også grafit på grund af sin høje kapacitet til effektivt at sprede varme i hele væsken. Denne varmespredning fortsætter med at trække varme fra huden, indtil alle mikroperler er smeltet, hvilket resulterer i en kølende effekt, som kan vare op til 8 timer*. Cryo Fluid mikroperler vil naturligt størke igen efter væsken vender tilbage til omgivelsestemperatur.

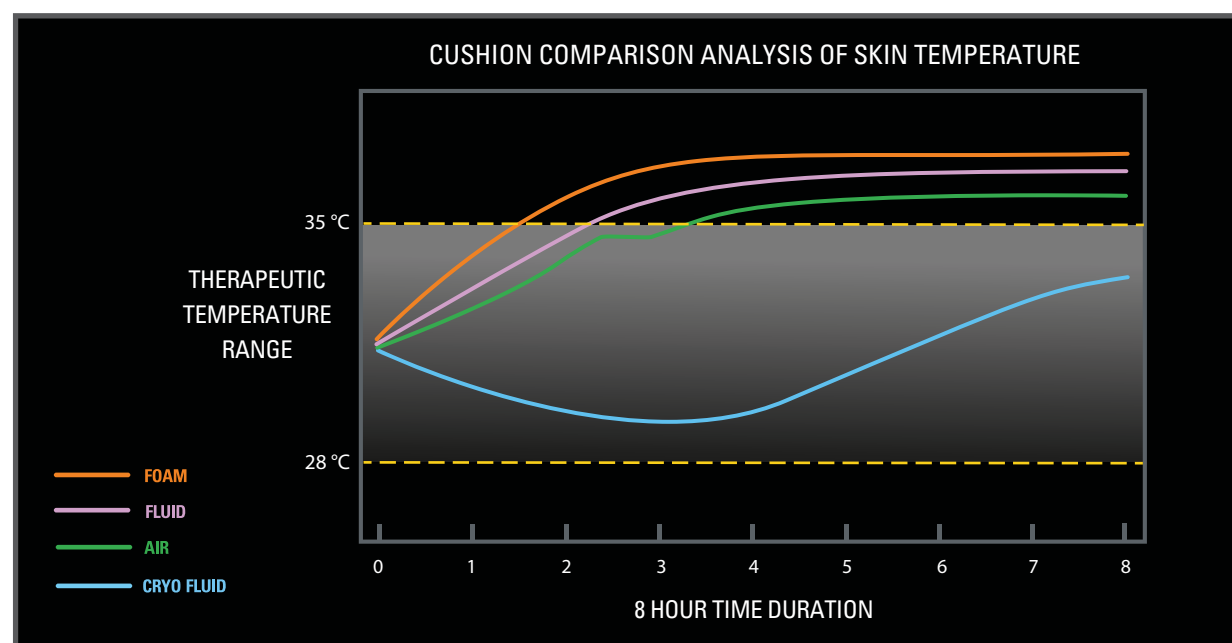



JAY J2

Stabilitet og positionering med høj trykaflastning

Produktegenskaber:

- Fast skumbase, anatomisk formet sædebrønd
- Pudren er meget stabil og kan kompensere for fejlstillinger og asymmetrier
- Basen kan skæres til og bygges op til individuelle tilpasninger
- 3-kamret JAY Fluidindlæg for nedsynkning og omslutning af sædekuderne. Blødt skumindlæg under lårene
- Stort udvalg af positioneringskiler samt træplade som tilbehør kan tilkøbes (læs mere om JAY Box på side 25)
- Luftcirkulationsbetræk som standard. Inkontinensbetræk kan tilkøbes



Klinisk anvendelse:

- Risikogruppe: Brugere med høj risiko for tryksår og shear
- Designet til brugere med symmetrisk og asymmetrisk holdning, med stort behov for stabilitet/positionering
- Brugere der ikke kan udføre selvstændig vægtoverføring har begrænset stabilitet og manglende evne til at ændre position




Størrelser

Dybde	Bredde					
	35	40	43	45	50	60
cm						
40						
43						
45						
50						

Den grønne markering indikerer i hvilke størrelser pudren findes samt muligheder for betræktyper

Bemærk JAY J2 puderne kan bestilles på mål efter ønske. Kontakt venligst kundeservice eller en konsulent for at høre mere.

Højde (i cm)	Højeste punkt
8	9

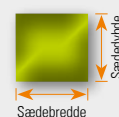

Pudens vægt i 39x41cm	2 kg
Maks. brugervægt	175 kg
Garanti	2 år

Luftcirkulationsbetræk*	
Inkontinensbetræk	
Strækbart betræk	

- *Standardbetræk
- Varenummer og HMI-nr. - se venligst separat oversigt på www.sunrisemedical.dk
- Leveringstiden kan variere afhængig af pudens størrelse. Kontakt venligst kundeservice for at høre mere om leveringstiden på et specifikt produkt.
- Puderne kan bestilles på andre mål, end dem angivet i skemaet. Kontakt kundeservice eller en konsulent for at høre mere.

JAY J2 DC

Stabilitet og positionering ved meget høj risiko for tryksår

Produktegenskaber:

- Fast skumbase, anatomisk formet sædebrønd
- Pudren er meget stabil og kan kompensere for fejlstillinger og asymmetrier
- Basen kan skæres til og bygges op til individuelle tilpasninger
- 3-kamret JAY fluidindlæg med ekstra Fluid for optimeret nedsynkning og omslutning af sædekuderne. Tykt, blødt skumindlæg under trochanter og frem under lårene
- Mulighed for at tilføje ekstra fluid supplement på indersiden af sædebrønden for yderligere trykaflastning
- Stort udvalg af positioneringskiler samt træplade som tilbehør (bemærk at dette er et tilkøb). Læs mere om JAY Box på side 25
- Luftcirkulationsbetræk som standard. Inkontinensbetræk kan tilkøbes



Klinisk anvendelse:

- Risikogruppe: Brugere med ekstremt høj risiko for tryksår og shear
- Anvendes til personer med symmetrisk eller asymmetrisk holdning
- JAY J2 DC yder den maksimale trykaflastning. Pudren anbefales til blandt andet dobbelt-amputerede og meget tynde personer, som har

brug for ekstra Fluid for en bedre bæreevne

- Brugere som ikke kan udføre selvstændig vægtoverføring, har begrænset stabilitet og manglende evne til at ændre position



Størrelser

Dybde cm	35	38	40	42	45	50	55	60
35								
38								
40								
42								
45								
50								

Den grønne markering indikerer i hvilke størrelser pudren findes samt muligheder for betræktyper

Bemærk JAY J2 DC puderne kan bestilles på mål efter ønske. Kontakt venligst kundeservice eller en konsulent for at høre mere.

Højde (i cm)	Højeste punkt
10,2	11

Pudens vægt i 41x41cm.	2,4 kg
Maks. brugervægt	150 kg
Garanti	2 år



Luftcirkulationsbetræk* **	
Inkontinensbetræk	
Strækbart betræk	

- *Standardbetræk
- ** *Baseret på Air Flow teknologi (ikke 3DX™)
- Varenummer og HMI-nr. - se venligst separat oversigt på www.sunrisemedical.dk
- Leveringstiden kan variere afhængig af pudens størrelse. Kontakt venligst kundeservice for at høre mere om leveringstiden på et specifikt produkt.



JAY GS

Vokser med barnet og giver stabilitet, positionering og trykaflastning



Produktegenskaber:

- Let skumbase med mulighed for udvidelse ved hjælp af positioneringskiler i sædebrønden. Udskæringer i forkanten af puden for at afhjælpe stramme hasemuskler
- Heldækkende JAY Fluidindlæg. Man kan vælge mellem 3 forskellige størrelser Fluidindlæg for at imødekomme barnets individuelle trykaflastnings- og positioneringsbehov
- Inkontinensbetræk som standard. Mikroklimatisk, luftcirkulerende betræk kan tilkøbes
- Stort voksepotentiale - kan vokse med barnet
- Pudens passer med JAY Fit ryggen. Tilsammen udgør de et komplet børnesiddesystem, som kan vokse med barnet! (Se side 42-43).

Klinisk anvendelse:

- Risikogruppe: Børn med høj risiko for tryksår og/eller behov for positionering
- Designet både til brugere med symmetrisk og moderat til svær asymmetrisk holdning, med store behov for positionering
- Brugere som ikke kan udføre selvstændig vægtoverføring, har begrænset stabilitet og manglende evne til at ændre position



Puden er på undersiden skåret til for at sikre optimal bækkenpositionering ved stramme haser.

Størrelser					
Dybde	Bredde				
cm	25	30	36	40	45
33					
38					
43					
48					
51					

■ Den grønne markering indikerer i hvilke størrelser puden findes samt muligheder for betræktyper

Højde (i cm)	Højeste punkt
8	9

Pudens vægt i 25x33cm.	0,6 kg
Maks. brugervægt	113 kg
Garanti	2 år



Luftcirkulationsbetræk	
Inkontinensbetræk*	

- *Standardbetræk
- Varenummer og HMI-nr. - se venligst separat oversigt på www.sunrisemedical.dk
- Leveringstiden kan variere afhængig af om varen er på lager eller om det er en bestillingsvare.
Kontakt venligst kundeservice for at høre mere om leveringstiden på et specifikt produkt.

Tilpasninger af JAY Balance, J2, J2 DC og GS

Alle puder kan tilpasses og giver fremragende positioneringsmuligheder. Vi tilbyder et stort udvalg af positioneringstilbehør, fra enkelte dele til hele sæt:

- Adduktionskiler
- Abduktionskiler
- Hoftestyr
- Bækkenskævhedskiler
- Ekstra Fluidsupplement
- Træplader
- Skråkile for vinkling af puden

JAY Balance bækkenskævhedskiler

I sædebrønden (under Fluidindlægget) kan der ydermere indsættes op til to bækkenskævhedskiler (obliquity pads)




GS positioneringskiler



Hoftestyr

Bensprederkile (abduktionskile)

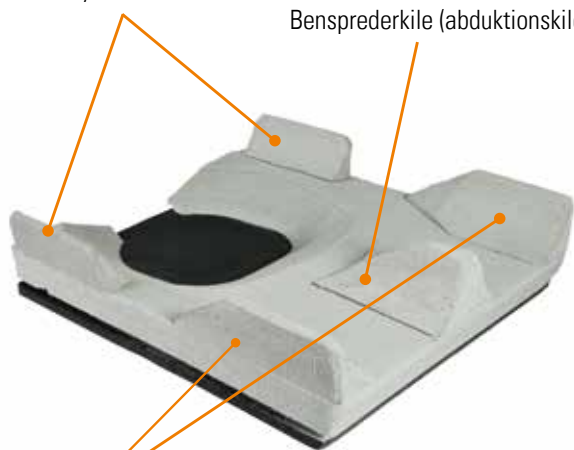

Bensamler (adduktionskiler)



J2 og J2 DC tilbehørsbox

Den komplette JAY Box kan købes, men man kan også blot vælge at købe enkelte dele fra den.

OBS: At skære i basen påvirker ikke strukturen på en skumbase med lukkede celler.



Coxit-løsning forfra



Coxit-løsning fra siden

Coxit-løsning

Mangler brugeren fleksion i den ene side af hoften, kan man bruge en pude med mulighed for en coxit-løsning, som enten tilpasses ude hos brugeren eller bestilles fra fabrikken.

Rengøringsvejledning JAY puder

Produkt	Lite	J2, J2 DC, J2 Plus, GS	Easy Visco	Zip	Xtreme Active	Basic	Balance Fluid/Luft
Yderbetræk (Luftcirkulerende og strækbart)							
(1). Maskinvask 70°C  Alternativ: Maskinvask 80°C i 10 min samt tørretumbling 	 	 	 	ikke relevant	 	ikke relevant	 
Yderbetræk (Inkontinens)							
(1). Maskinvask 60°C  Alternativ: Maskinvask 80°C i 10 min samt tørretumbling 	ikke relevant	 	 	 	 	 	 
Inderbetræk							
Spray og aftørningsdesinfektion  eller maskinvask 40°C (1) 	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	 	 	ikke relevant	 
Skumbase							
(2). Autoklave op til 105°C (1) 							
Spray og aftørningsdesinfektion 							
(3). Nedsænkingsdesinfektion 							
Pudeelementer							
ROHO-luftindlæg (Spray og aftørningsdesinfektion) 	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	
Positioneringskiler (Spray og aftørningsdesinfektion) 	ikke relevant		ikke relevant	ikke relevant		ikke relevant	
Fluidindsats (Spray og aftørningsdesinfektion) 	ikke relevant		ikke relevant	ikke relevant		ikke relevant	
(1) Anbefalede temperaturer. (2) En autoklave er en maskine, der steriliserer med damp under tryk. (3) Ved lav temperatur (< 30°C).							
Produktgarantien gælder ikke for produkter, der er beskadiget på grund af manglende overholdelse af disse rengøringsanvisninger eller brug af uegnede rengøringsmidler. Puder, positioneringselementer og betræk tåler rengøring i henhold til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren.							
Anbefalede desinfektionsmidler Alle desinfektionsmidler som er anført og anbefalet af Robert Koch-instituttet: http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Desinfektionsmittelliste.pdf?__blob=publicationFile							

Noter

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page below the orange header band.



JAY RYGGE

■	JAY J3	Den mest alsidige JAY ryg og støtte til den aktive bruger	30-39
■	JAY Zip	Let, alsidig, designet til børn	40-41
■	JAY Fit	Modulær, justerbar konturryg designet til børn/unge og voksne	42-43
■	JAY Fit 2U	Multi-dimensionel støtte til børn med komplekse udfordringer	44-45

Faste rygge fra JAY

Rygge fra JAY er udviklet til sikkert at styre overkroppen og for at undgå eller rette postural skade. Det er faste rygge med bløde skumindsatser, som er lette i vægt, nemme at montere og passer til de fleste kørestolsmodeller. Ryggen kan tilpasses i høj grad, så man opnår en næsten individuel ryg.

Siddesystem


Kombinerer man en ryg med en tilpasset pude, udgør det et komplet siddesystem. Et rigtigt tilpasset siddesystem bidrager til en optimal sidde- og kørestilling for mest mulig fornuftig brug af kræfter.

Ved manglende indvendig stabilitet må dette erstattes af udvendig stabilitet - gennem en stabiliserende pude og en stabiliserende ryg, som kan bidrage til at opretholde en funktionel siddestilling over tid.

Kliniske fordele med faste rygge

- Øget stabilitet i overkroppen
- Rigtig siddeergonomi
- Bedre trykfordeling
- Øget komfort
- Energioptimering

Resultatet: Øget funktion og færre kræfter bruges på at sidde.

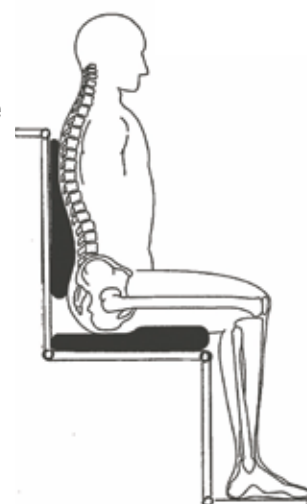

JAY J3

Introduktion

JAY J3 ryggen kan fuldstændig skræddersys til den enkelte bruger. Ryggen består af et stort udvalg af størrelser, udformninger og muligheder for brugere, som behøver en meget præcis tilpasning - en næsten individuel, rygstøtte.

Ryggen tilbyder det absolut højeste mulige niveau af støtte fra en modulært opbygget ryg og passer til aktive såvel som passive brugere samt brugere i både manuelle og el-kørestole.

Det komplette siddesystem med JAY J3 ryg

JAY J3 ryggen kan kombineres med en tilpasset JAY pude - tilsammen udgør de et komplet siddesystem.

Fordelene ved en JAY pude vil ydermere optimeres, når den bruges sammen med en ryg som JAY J3, som kan give en god position, stabilitet, komfort og funktion. Siddesystemet er justerbart og modulbaseret for at dække brugernes behov.



JAY J3


Produktoverview og produkttegenskaber

Den anatomisk udformede JAY J3 ryg tilbyder mange løsninger i ét produkt:

- 4 konturer (lateral støtte)
- 4 støtteniveauer
- 3 ryghøjder indenfor hvert støtteniveau
- Mange positioneringsmuligheder
- Findes i en meget letvægts, carbon (kulfiber) version
- Enkel at anvende og montere med JAY monteringsbeslag
- Den maksimale brugervægt er 136 kg for standard JAY J3 aluminium ryggene og 125 kg for carbon ryggene

4 støtteniveauer

Skulderhøjde (SH - Shoulder Height)	53-61 cm
Høj thorakal (UT - Upper Thoracic Height)	42-50 cm
Mellem thorakal (MT - Mid Thoracic Height)	30-38 cm
Lav thorakal (LT - Lower Thoracic Height)	17-24 cm

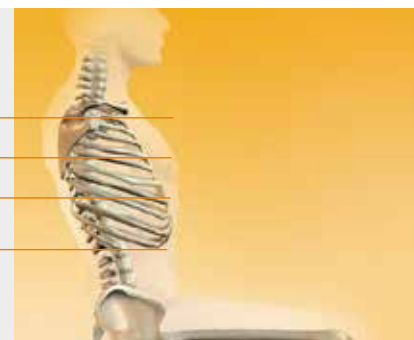

3 ryghøjder

To forskellige personer kan have behov for støtte på samme sted, men eventuelle højdeforskelle gør, at de har behov for forskellige ryghøjder. Derfor findes JAY J3 i tre ryghøjder indenfor hvert støtteniveau:



Lav (S - Short)



Medium (M)



Høj (T - Tall)

JAY J3

Produktegenskaber - rygkonturer



4 konturer - set fra siden



Standard kontur
(SC)



Mellem kontur
(MC)



Dyb kontur
(DC)



Rib kontur
(MDC)

6 konturer - set oppefra

Standard kontur

(Kropsstøtte og hovedstøtte kan tilkøbes)



Mellem kontur

(Kropsstøtte og hovedstøtte kan tilkøbes)



Dyb kontur

(Hovedstøtte kan tilkøbes)



Rib kontur

(Kropsstøtte og hovedstøtte kan tilkøbes)



Rib kontur ekstra dyb

(Kropsstøtte og hovedstøtte kan tilkøbes)



Dyb kontur ekstra dyb

(Kropsstøtte og hovedstøtte kan tilkøbes)



JAY J3

Produktegenskaber - komfort og betræk

JAY J3

RYGGE

Mere komfort for brugeren - ny afrundet kant

Den øverste kant på skallen af JAY J3's LT-rygge er som noget nyt blevet afrundet på Standard kontur (SC) og Hip konturen (PDC). Læs mere om ryghøjder og konturer på side 31-32.

Det øger komforten betydeligt for brugeren, som læner sig bagover under påklædning og giver en generelt større bevægelsesfrihed.

Komfortabelt, mikroklimatisk betræk



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
Betrækket på JAY J3 ryggen er lavet i et behageligt og blødt luftcirkulerende (Mikroklimatisk) materiale (3DX™ Spacer Fabric), som transporterer varme og fugtighed og øger luftgennemstrømningen gennem ryggen. Betrækket kan vaskes ved 60°C i vaskemaskine og tørrer hurtigt.

Billedet her viser en J3 Carbon ryg. Læs mere på side 33.


JAY J3

Produktegenskaber - stabilitet og positionering


De forskellige konturer og ryghøjder findes i følgende kombinationer:

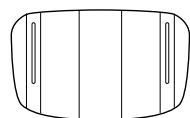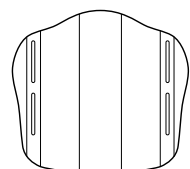Standard kontur
(SC)Mellem kontur
(MC)Dyb kontur
(DC)Rib kontur
(MDC)Lav
thorakal
(LT - Lower
Thoracic
Height)Mellem
thorakal
(MT - Mid
Thoracic
Height)

Kropsstøtte, hovedstøtte og brystsele findes for MT, UT, SH højder

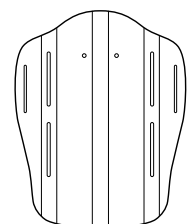Høj
thorakal
(UT - Upper
Thoracic
Height)

Kropsstøtte, hovedstøtte og brystsele findes for MT, UT, SH højder

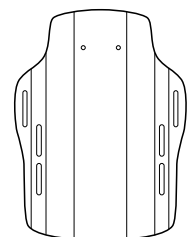Skulder-
højde
(SH -
Shoulder
Height)

Findes i bredderne

31, 36, 41, 46
og 51cm31, 36, 41, 46
og 51cm36, 41, 46
og 51cm31, 36, 41, 46
og 51cm

Passer til kørestolsbredder op til 5 cm bredere end rygbredden.



JAY J3

Carbon ryg - let ryg til den aktive bruger

JAY J3

JAY J3 Carbon ryg

JAY J3 Carbon ryggen er til den aktive bruger, som ønsker en forholdsvis lav rygstøtte. Ryggen er i et flot og tidsløst design, som samtidigt er meget let i vægt. Den er lavet i Carbon (kulfiber), som er ekstremt let og stærkt og derfor det optimale materiale til denne kørestolsryg. Carbon har samme styrke som aluminium, bare 60% lettere. Ryggen kan fås med enten faste beslag eller quick release beslag for nem på- og afmontering ved eventuel sammenklapning af kørestolen.

JAY J3 Carbon ryggen findes i fire ryghøjder fra 17 til 38 cm og fokuserer dermed på den aktive kørestolsbruger med behov for lav til moderat rygstøtte. Ryggens 5 cm dybe kontur giver endvidere let tværgående støtte.

RYGGE



Kontur til aktive brugere
Moderat lateral støtte
med 5 cm konturdybde



Forskellige støtteniveauer
Altid den rigtige støtte med 4 ryghøjder:
17 til 38 cm

Tekniske specifikationer JAY J3 Carbon ryg

Rygbredde	32 / 36 / 41 / 46 cm
Ryghøjde	17 / 24 / 30 / 38 cm
Vægt	fra 690 g
Maksimal brugervægt	125 kg
Garanti	2 år

- Varenummer og HMI-nr. - se venligst separat oversigt på www.sunrise-medical.dk
- Kontakt kundeservice for at høre om leveringstiden på et specifikt produkt.

Rygvinkel	± 20°
Konturdybde	5 cm
Montering	Fast montering eller quick release
Betræk	Mikroklimatisk, antimikrobiel og fugtafvisende
Tilbehør	Taske med lynlås, lændestøtte

JAY J3



Produktegenskaber - positioneringsmuligheder

Mange positioneringsmuligheder

JAY J3 ryggen giver rig mulighed for en næsten skræddersyet positionering af brugeren og leveres som standard med positioneringskiler til korsben/bækken.

Yderligere positioneringskiler kan tilkøbes.

- Positioneringskiler for optimal postural stabilitet og korrigerende/tilpasning af let til moderat postural deformitet
- Maksimal trykfordeling
- Mange tilpasningsmuligheder
- Fokus på komfort og siddetolerans

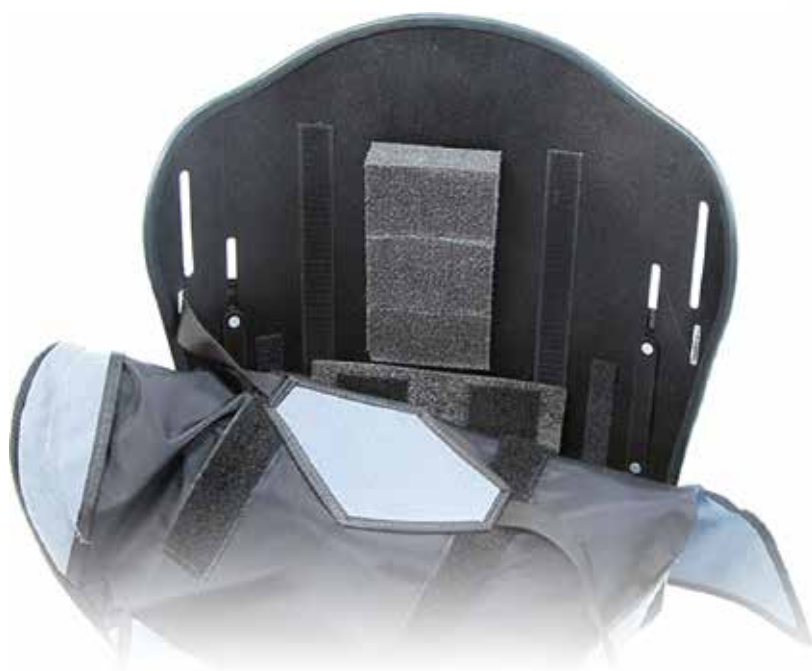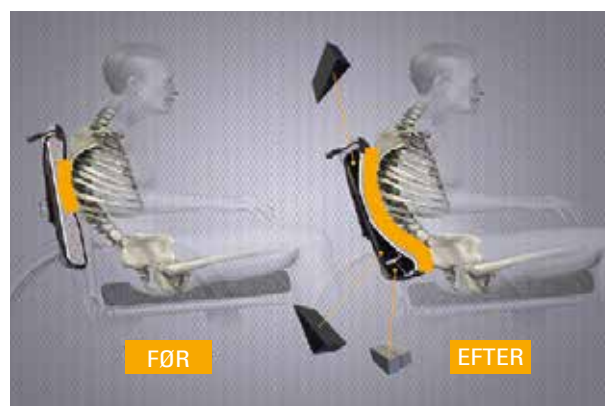

Der findes flere forskellige sæt med 7, 12 eller 36 positioneringskiler



JAY J3

Produktegenskaber - monteringsbeslag; brugervenlige, smarte og kompatible

JAY Monteringsbeslag - nemme at anvende og montere

JAY Monteringsbeslag er nemme at montere og fjerne, plus de er kompakte og justerbare. Man kan endda justere ryggen og indsætte positioneringskiler, mens brugeren sidder i stolen.

- Stabile og lette
- 2-punkts og 4-punktsbeslag, som monteres på rygrøret
- Kompatibelt med mange forskellige typer af rørstørrelser (runde)
- Tilpasses individuelt efter brugerens behov
- Ingen sædedybde mistes
- Let at anvende for både bruger og ledsager
- Enkel at montere og tilpasse
- Justerbar: Bredde 5 cm, dybde 3 cm, vinkel +/-22°
- Kollisionstestet og godkendt



Standard monteringsbeslag (CH = Compact Hardware). Standardmonteringsbeslaget giver en dybdejustering på 3 cm, hvilket bevirker, at ryggen vinkles bagover uden at sædedybden påvirkes. Derudover kan ryggen justeres med op til 5 cm i bredden, hvilket gør det muligt at montere en smal ryg på kørestolen. CH er standard for alle LT og MT rygge.



Heavy Duty monteringsbeslag (HD). HD er standard for alle UT og SH rygge. Kan også bestilles til MT rygge (bredde 46 og 51 cm) og LT rygge (bredde 51 cm).

Monteringsbeslag kan monteres forskellige steder uden at ændre den ønskede rygposition

Det unikke 2-punktsbeslag fylder meget lidt og kan monteres uden at påvirke brugerens ønskede rygposition.

En sjælden gang imellem må man gå på kompromis med den ønskede placering af ryggen pga. forhindringer såsom armlæn og andet udstyr monteret derpå.



JAY J3

Produktegenskaber - monteringsbeslag fortsat

Kompatibelt med forskellige typer af rør

- Smart beslagdesign som er kompatibelt med de fleste kørestole på markedet. (Kombinationsaftale findes med andre producenter)
- Kompatibelt med 2,22 cm (7/8") – 3,18 cm (1 1/4") rør
- Kan også monteres på andre rørprofiler



2,8 cm



2,5 cm



1,9 cm

Kan tilpasses personer, som er bredere over hoften end torsoen uden at bruge yderligere hardware/udstyr

JAY J3 ryggen har 5 cm breddejustering, hvilket gør det muligt at anvende en smallere ryg. For eksempel kan en 41 cm bred ryg tilpasses en 46 cm bred stol.



Enkel at anvende

Med JAY Monteringsbeslaget kan JAY J3 ryggen enkelt på- og afmonteres med minimal håndkraft og begrænset fingerfærdighed. Dette betyder, at brugeren kan gøre det selvstændigt. Den automatiske låsemekanisme sikrer desuden, at ryggen kan sættes tilbage på en sikker måde.



JAY J3

Produktegenskaber - tilkøb og tilbehør

Tilkøb og tilbehør

Hovedstøtte



Standard hovedstøtte og standard pude



Flip-back hovedstøtte og kontur pude med siddestøtte



JAY Monteringsbeslag



Universalbeslag

Kropsstøtte



Kropsstøtte; fast eller swing away
Findes i 6 størrelser - 10x10cm, 10x12cm, 10x15cm, 15x10cm, 15x12cm og 15x15cm

Alle J3-rygge, der kan bruge nakkestøtter, er testet og godkendt til transport i henhold til relevante ISO-standarder



Taske



Stilfuld og holdbar taske til sikkert at transportere mindre, essentielle ejendele

Positionering



Overkrop og bækken positionering kan fåes i 4 størrelser (S,M,L og XL)

JAY Zip

Komfortabel og konturformet ryg, specialudviklet til børn

JAY Zip ryggen er specielt designet til børn og unge og har mange af de samme funktioner og fordele som JAY J3 ryggen. Designet tager udgangspunkt i antropometrisk data for at sikre, at ryggen er tilpasset børns unikke behov. Det er en ultra letvægtsryg med et meget praktisk inder-/yderbetræk. Derudover findes den i mange størrelser og bredder, kan tilpasses i høj grad, har en hurtig et-trins-udløser og kan monteres på mange forskellige rørtyper og størrelser.

Produktegenskaber

- Nem og alsidig et-trins-udløser (quick release), så JAY Zip ryggen hurtigt kan tages af ved f.eks. sammenfoldning af kørestolen
- Passer til mange forskellige rørtyper: 1,9 cm (med mellemstykke), 2,2 - 2,3 cm (med mellemstykke) og 2,5 cm (uden mellemstykke)
- Kan justeres med blot et enkelt stykke værktøj
- Stort sortiment af størrelser i både højden og bredden
- Findes i farvekombinationerne: Sort/sort, sort/blå og sort/lyserød (sort/sort er standard)
- JAY Zip ryggen i kombination med JAY Zip puden udgør et komplet siddesystem for børn



Hurtig et-trins-udløser (quick release)



JAY Zip ryggen passer med JAY Zip puden (læs om Zip puden på side 12)

Rygbredde	20 / 25 / 30 / 35 cm
Ryghøjde	15 / 20 / 25 / 30 cm
Transportvægt	1,1 kg
Maksimal brugervægt	75 kg
Garanti	2 år

- Varenummer og HMI-nr. - se venligst separat oversigt på www.sunrise-medical.dk
- Kontakt kundeservice for at høre om leveringstiden på et specifikt produkt.

Rygvinkel	+20° to -20°
Bredde justerbarhed	+2,5 cm
Dybde justerbarhed	7 cm
Betræk	Mikroklimatisk spacer tekstil, antimikrobiel og fugtafvisende
Tilbehør	Hovedstøtte (small, medium), kropsstøtter (faste eller swing-away), kiler til korrigering, positioneringsseler, lændestof (vanity flap) og ekstra betræk

JAY Zip

Komfortabel og konturformet ryg, specialudviklet til børn

JAY ZIP

Praktisk og antibakteriel

Yderbetræk

- Kan vaskes i vaskemaskine og tørrer hurtigt
- Ekstra lag nedenunder som består af luftcirkulerende (Mikroklimatisk) tekstil (3DX™ Spacer Fabric), som er et holdbart og blødt stretchmateriale med høj komfort, sved- og fugttransportering og åndbarhed
- Betrækket har indvævede sølvfibre (X-static™ teknologi), hvilket giver betrækket en antimikrobiel effekt

Inderbetræk

- Nemt at tørre af
- Aquaguard™ lynlås anvendt, som er vand- og fugtafvisende
- Anti-fugttransporterende søm, som beskytter skumbasen

RYGGE



JAY Fit

Siddesystem for børn og unge voksne med komplekse positioneringsbehov

JAY Fit ryggen er en modulær, justerbar konturryg, som er udviklet specielt til at imødekomme børn og unge voksne med komplekse positionerings- og siddebehov. Ryggen er formet, så den stabiliserer bækkenet, giver stabilitet i overkroppen samt sikrer en korrekt placering i kørestolen. Med JAY Fit ryggen opnås øget komfort, en god siddestilling og et højere funktionsniveau for brugeren.

Produktegenskaber

- Giver god stabilitet, komfort og er fokuseret på børn/unge voksne med komplekse siddestillings- og positioneringsbehov.
- Kan justeres i meget høj grad og vokser med brugeren. Husk: Regelmæssig opfølgning 2-3 gange om året. Børn vokser og ændrer sig, så kørestolen og siddesystemet skal derfor regelmæssigt justeres.
- JAY Fit ryggen i kombination med JAY GS puden udgør et komplet siddesystem for børn og unge voksne - et siddesystem som kan vokse i takt med alderen!



JAY Fit ryg med
sidestøtter



JAY Fit ryg med JAY GS udgør tilsammen et komplet Fit siddesystem for børn og unge voksne (Læs om JAY GS puden på side 24)

JAY Fit

Siddesystem for børn og unge voksne med komplekse positioneringsbehov

Avanceret ryg og luftcirkulerende betrækdesign

Tilpasning & montering

- Ryggen er dybde-, højde- og vinkelregulerbar
- Mange forskellige rygsøjle-positioneringskiler for optimal støtte og øget siddetolerance (Bemærk dette er et tilkøb)
- JAY Fit monteringsbeslag sikrer, at Fit ryggen er nem at bestille, montere og justere, og at den passer til forskellige rørtyper og størrelser

Betræk fra JAY J3

- Det velafprøvede betrækdesign fra JAY J3 ryggen bruges nu også på JAY Fit ryggen - et luftcirkulationsbetræk (3DX™ Spacer Fabric) for varme og fugtafledning, som forebygger hudskader



JAY Fit ryg kan monteres på stort set alle kørestole. Dette billede viser en ZIPPIE IRIS kørestol med et komplet siddesystem med JAY Fit ryg, sidestøtter og JAY GS pude.



Ryggen er nem at montere med JAY Fit monteringsbeslag

Rygbredde	25 / 30 / 35 / 40 / 45 cm
Ryghøjde	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 cm

- Varenummer og HMI-nr. - se venligst separat oversigt på www.sunrise-medical.dk
- Kontakt kundeservice for at høre om leveringstiden på et specifikt produkt.

Maksimal brugervægt	113 kg
Garanti	2 år
Betræk	Luftcirkulerende mikroklimatisk betræk som standard. Ekstra inkontinensbetræk kan tilkøbes.
Tilbehør	Hovedstøtte og kropsstøtter (faste eller swing-away, small, medium eller large)

JAY Fit 2U Ryg

JAY FIT 2U Ryg – Prøv den, tilpas den nemt og hurtigt, gentilpas den efter behov

Til personer, der har brug for en mere kompleks siddeløsning, når en standard ryg ikke er tilstrækkelig til at håndtere brugerens ortopædiske asymmetrier, eller når en formstøbt ryg ikke kan efterkomme ændringer i behov. Kombineret med JAY GS puden er den en fremragende løsning til børn, der vokser og ændrer behov - ideel for pædiatriske brugere.

- Multidimensionel støtte, som imødekommer ortopædiske asymmetrier eller udtalt torso rotation
- Fleksibel og hurtig at ændre - justeringer foretages ved levering og over tid
- "Svalehale" indsatser - tilføj eller fjern de forenelige indsatser for at skabe en personaliseret kontur



ZIPPIE IRIS® med JAY FIT 2U® ryg og JAY GS® pude



Innovativ betræk-teknologi

- JAY FIT 2U ryggen har et strækbart yderbetræk og blødt skum indeni for maksimal komfort og brugerbeskyttelse
- Yderbetrækket kan nemt tages af og rengøres, mens det indvendige betræk holder indsatserne tørre og på plads
- Kan maskinvaskes ved 60° C og tørrer hurtigt

JAY Fit 2U Ryg

Få den til at passe – mere individualitet og personalisering

JAY FIT 2U kommer med mange forskellige muligheder for tilvalg og tilbehør, som garanterer en optimal pasform for brugeren.



Whitmyer® hovedstøtte

Whitmyer® hovedstøtter yder støtte til hoved og nakke, hvis du bruger tilt-in-space kørestole eller har brug for ekstra støtte til at holde hovedet oprejst.



JAY rotérbare Swing-Away sidestøtte

Justérbare, svingbare sidestøtter til yderligere justering for thorax støtte.



JAY positionering

Et udvalg af seler tilbydes sammen med den nye JAY FIT 2U ryg for at imødekomme eventuelle yderligere positioneringsbehov.



Farver på rygskal

Personliggør rygskallen, så den matcher til din kørestol, eller udtryk din kreativitet. Hér vist i farven Green Apple, på billedet til venstre. Bemærk venligst: print kan ikke gengive farver nøjagtigt. Faktiske farver kan variere.

Forbedrede monteringsbeslag – justerbar og hurtig montering

JAY FIT 2U rygge anvender de patenterede J3-monteringsbeslag med quick release-udløser for hurtig afmontering og justering af ryggen.

- Monteringsbeslagene er nemme og hurtige at montere og justere
- Beslagene er allerede monteret på rygskallen for at lette montering
- Fås som fire-punkts beslag (FP) og to-punkts beslag (to-punkts beslag kun tilgængelig som reservedele)
- Crashtestet og godkendt til transport



Noter

Noter

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page below the orange header band.



Om SUNRISE MEDICAL

VORES MISSION ER AT FORBEDRE MENNESKERS LIV VED AT TILBYDE INNOVATIVE PRODUKTER AF HØJ KVALITET

Sunrise Medical er ledende inden for udvikling, design, produktion og distribution af manuelle kørestole, el-kørestole, rollatorer, scootere og siddesystemer. Sunrise Medical producerer sine produkter på egne fabrikker i USA, Mexico, Tyskland, Storbritanien, Holland, Polen, Spanien og Kina. Vores hovedprodukter, som markedsføres under brandnavnene Quickie, Zippie, Breezy, Sterling, JAY og Gemino sælges gennem et netværk af forhandlere og/eller egne distributører i over 130 lande. Sunrise Medicals hovedkontor i Europa ligger i Malsch, Tyskland og det nordamerikanske hovedkontor ligger i Fresno, Californien.

Selskabet beskæftiger ca. 2300 ansatte over hele verden.

VORES HJERTEBLOD ER MOBILITET OG SIDDESTILLING

I Sunrise Medical er vi specialister i at skabe løsninger til at sikre bevægehæmmede den bedst mulige mobilitet med højst mulig komfort. Vores løsninger henvender sig til brugere på alle funktionsniveauer. Det betyder i praksis, at vi rådgiver om løsninger til såvel den helt passive bruger, der har behov for tryghed, støtte og komfort til den meget aktive bruger, der har behov for størst mulig aktionsradius. Aldersmæssigt spænder de brugere vi rådgiver fra børn og teenagere til voksne og ældre.

SUNRISE MEDICAL DANMARK - DIN LOKALE SAMARBEJDSPARTNER

I Danmark har Sunrise Medical eksisteret siden 2015. Vores landsdækkende netværk af konsulenter tager sig af afprøvninger, bestillinger og tilpasninger af alle produkter i sortimentet. De står klar til at rådgive og vejlede alle kunder i Danmark, Grønland og Færøerne. For en detaljeret distriktsoversigt besøg venligst vores hjemmeside **www.sunrisemedical.dk**.

Kundeservice kan træffes på **+45 70 22 43 49** og **info@sunrisemedical.dk**, mandag til torsdag fra kl. 8-16, samt fredag fra kl. 8 -15.30.



Hovedkontor/Showroom Øst
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup

Kontor/Showroom Vest
Sindalsvej 9
8240 Risskov

T: +45 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk