


Ledsagerstyring Z-steer

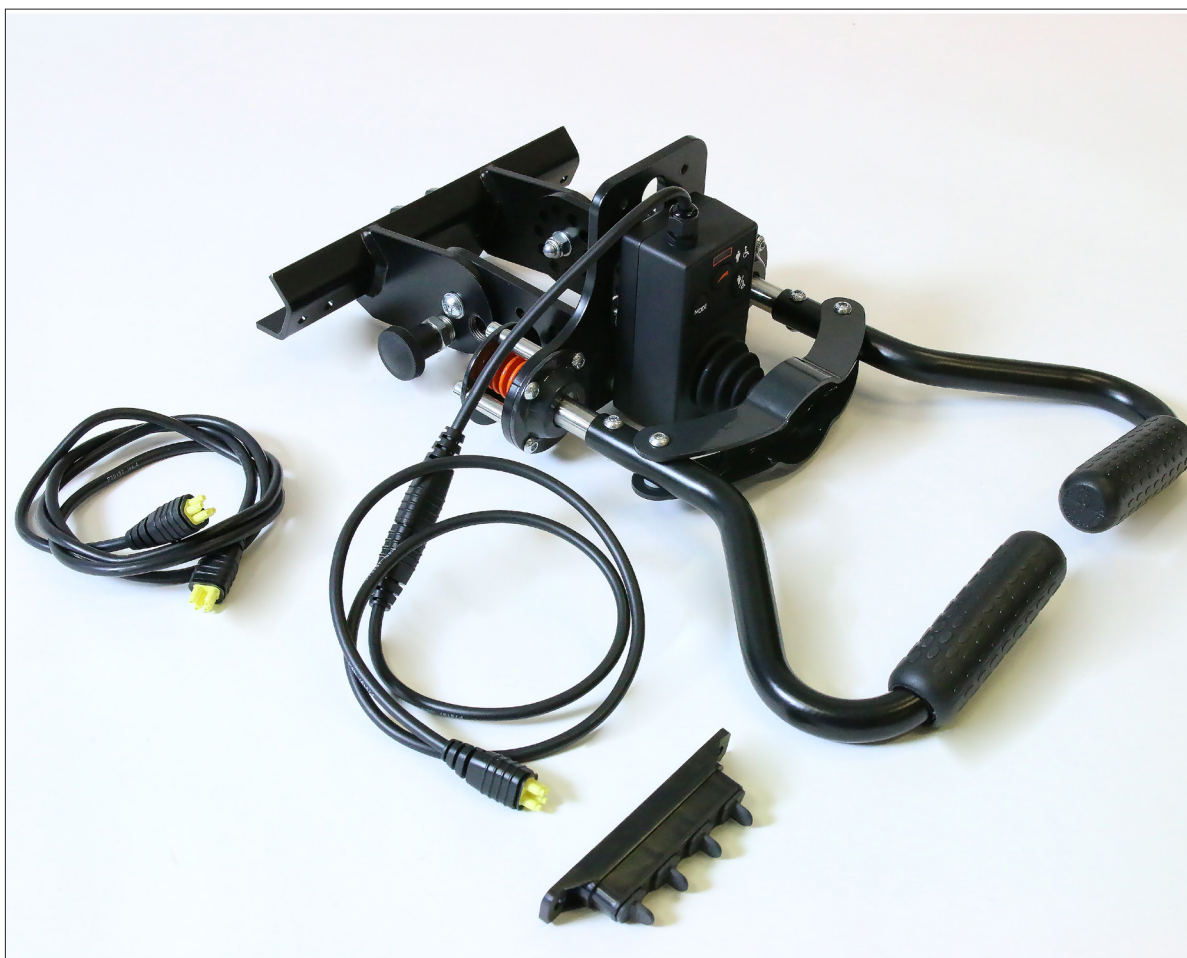

Beskrivelse


Ledsagerstyring Z-steer uten sikkerhetsbøyle

5005151


Sikkerhetsbøyle

5005150



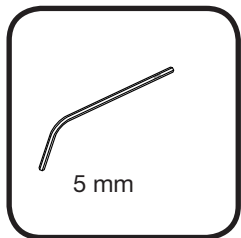

5 mm

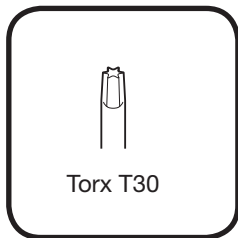

Torx T30



Fastnøkkel
13 mm

NO

1. Montering av ledsagerstyring:

Før montering av ledsagerstyringen, må en skru av nakke- støttefestet **A** og tverrstaget **B**. Nakkestøttefestet flyttes over til ledsagerstyringen. Ledsagerstyringen festes på tilsvarende sted som tidligere tverrstag **B** ved å benytte de samme skruen **C**, som var brukt før.

Sjekk før bruk:

Påse at ledsagerstyringen ikke står utsatt til for skade eller utilsiktet kan hekte seg fast ved bruk. Kontroller at alle innstillinger av stolen som elektrisk ryggvinkling og setetilt er overens med den valgte plasseringen, og ikke fører til klemfare eller andre konflikter i forhold til seteenheten.

2. Justering av kjørehåndtak:

Ledsagerstyringen er utstyrt med hurtigkoblinger **D**, som gjør at man kan justere kjørehåndtaket i forskjellige høyder for å oppnå behagelig kjørestilling. Hurtigkoblingen på hver side trekkes ut og settes i nøytral posisjon. Juster kjørehåndtakene til ønsket høyde, og frigjør hurtigkoblingene så de går i lås. Kjørehåndtaket kan også slås helt ned, for å minske plassbehovet. Når håndtaket felles ned skal det påse at det ikke ligger gjenstander eller befinner seg utstyr på stolen, som kan komme i klem ved bruk av ryggvinkel, tilt og setehøyde regulering.

Funksjon kjørehåndtak:

Forover: Press ned

Bakover Trekk opp

Sving: Beveg sideveis

3. Sikkerhetsbøyle:

Ved montering av sikkerhetsbøyle, må 4 av hylsene fjernes (2 på hver side), og erstattes av medfølgende kortere hylser **E**. Ved bruk av sikkerhetsbøyle oppnår man sikrere kjøring ved trange områder innendørs og man får en enklere kjøring over distanse utendørs da dette fungerer som et gripehåndtak under lengre turer.




Ønske man en annen akselerasjon, svingfart eller oppbremsing ved kjøring kan dette justeres i programmet til stolen. Dette utføres kun av kyndig tekniker/konsulent.

Betjening:

Av/På

Overta kjøring

Tildel kjøring til bruker

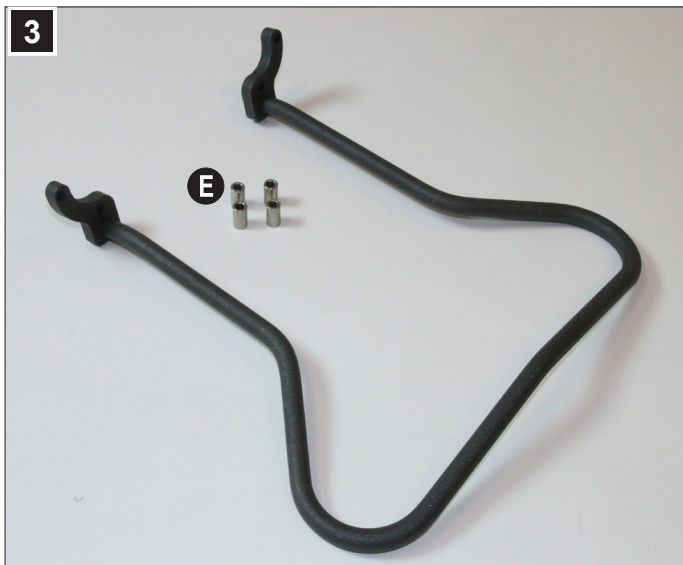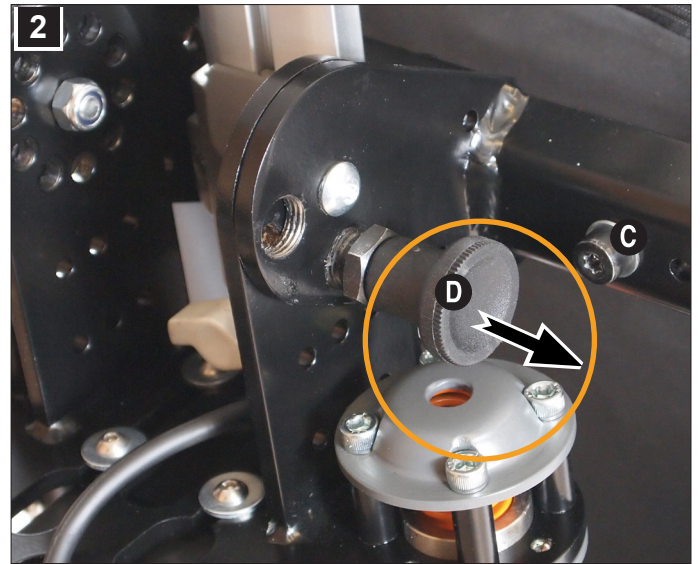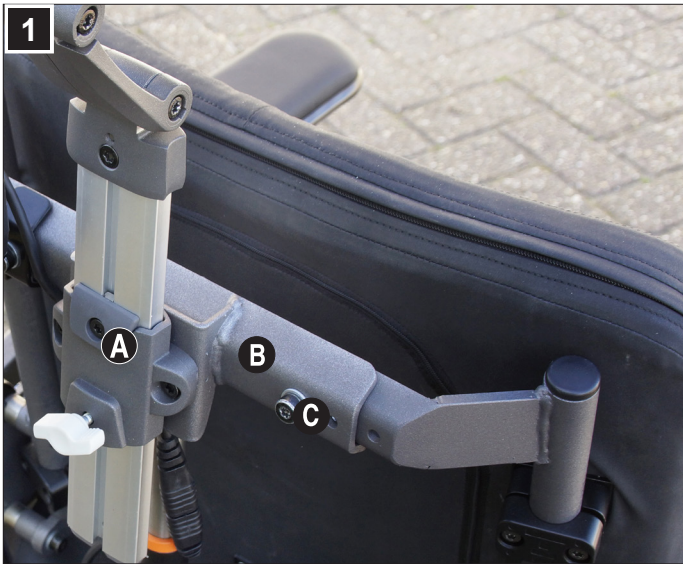



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 593 888
customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu