

Periodisk ettersyn

OPPREISINGSSTOL

☐ Nova 20

☐ Nova 30


Serienummer:

Hj.m.nr.:

Individ nr.:

Dato for ettersyn:

Signatur:

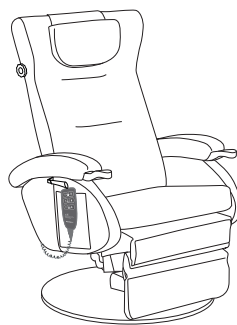

NOVA 20
NOVA 30

Ettersyn etter seks måneder, deretter hvert år

	I orden	Tiltak	Kommentar
1. Elektronikk			
1.1. Kontroller at ledningspluggen sitter fast i kontrollboksen og at lokket på kontrollboksen er lukket. Se eventuelt skjema i Nova delekatalog, kapittel 2.			
1.1.1. Ledning ryggmotor - kontrollboks			
1.1.2. Ledning løftmotor - kontrollboks			
1.1.3. Ledning tiltmotor - kontrollboks (kun Nova 30)			
1.1.4. Ledning batteriboks - kontrollboks			
1.2. Kontroller ledninger for klemskader.			
1.2.1. Ledning ryggmotor - kontrollboks			
1.2.2. Ledning løftmotor - kontrollboks			
1.2.3. Ledning tiltmotor - kontrollboks (kun Nova 30)			
1.2.4. Ledning batteriboks - kontrollboks			
1.3. Kontroller at ledningen til stikkontakt er uten skader og ikke er viklet inn i stolens mekanikk.			
1.4. Funksjonskontroll: Kjør alle funksjoner til endeposisjon. Utfør funksjonskontroll med belastet stol, en person i stolen.			
1.4.1. Løft/hvile 			
1.4.2. Rygg 			
1.4.3. Tilt (Kun Nova 30) 			

Ettersyn etter seks måneder, deretter hvert år			
	I orden	Tiltak	Kommentar
1.5. Kontroller håndkontroll for skader.			
1.5.1. Display			
1.5.2. Kabel			
2. Mekanikk			
2.1. Kontroller mekanikk, stag og braketter for deformasjon/skader.			
2.1.1. Svingelement med wire			
2.1.2. Løftemekanikk			
2.1.3. Tilt (kun Nova 30)			
2.1.4. Rygg			
2.1.5. Nakkevinkling			
2.1.6. Fotbrett			
2.2. Kontroller alle festepunkter for løse skruer/klips, stram eventuelt til.			
3. Understell			
3.1. Dersom sving, kontroller at svingen går i lås.			
3.2. Kontroller at filtknotter er funksjonelle under trefoten.			
3.3. Dersom transporthjul, kontroller at hjulene løper fritt og er uten skader.			
4. Komfortsonen (sete - rygg - armlene - fotbrett - nakkepute)			
4.1. Kontroller at skum og tekstil/hud er uten skader.			
4.1.1. Ryggtrekk			
4.1.2. Armlenstopp			
4.1.3. Armlensside			
4.1.4. Fotbrett m/kanal			
4.1.5. Sittepute			
4.1.6. Nakkepute			
4.2. Kontroller at ryggtrekk er festet med klips og glidelås i bakkant.			
4.3. Kontroller festepunktene til armlenene.			
4.4. Kontroller festepunktene til fotbrettet.			
5. Merking			
5.1. Kontroller at merking av stolen samsvarer med oversikt i brukermanualen			
6. Brukermanual			
6.1. Kontroller at brukermanualen er tilgjengelig			