

Rutiner ved gjenbruk/resirkulering

OPPREISINGSSTOL


☐ Nova 20

☐ Nova 30

Serienummer:

Hj.m.nr.:

Individ nr.:

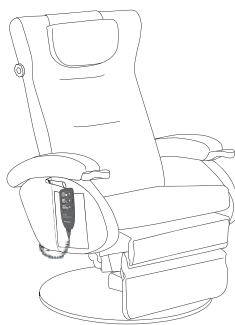

NOVA 20
NOVA 30

Dato for ettersyn:

Signatur:

Det anbefales å begynne med å demontere det som skal byttes i henhold til hjelpemiddelsentralens bestemmelser.

	Kontrollert
1. Elektronikk	
1.1. Kontroller at ledningspluggen sitter fast i kontrollboksen og at lokket på kontrollboksen er lukket. Se eventuelt skjema i Nova delekatalog, kapittel 2.	
1.1.1. Ledning ryggmotor - kontrollboks	
1.1.2. Ledning løftmotor - kontrollboks	
1.1.3. Ledning tiltmotor - kontrollboks (kun Nova 30)	
1.1.4. Ledning batteriboks - kontrollboks	
1.2. Kontroller ledninger for klemskader.	
1.2.1. Ledning ryggmotor - kontrollboks	
1.2.2. Ledning løftmotor - kontrollboks	
1.2.3. Ledning tiltmotor - kontrollboks (kun Nova 30)	
1.2.4. Ledning batteriboks - kontrollboks	
1.3. Kontroller at ledningen til stikkontakt er uten skader og ikke er viklet inn i stolens mekanikk.	
1.4. Funksjonskontroll: Kjør alle funksjoner til endeposisjon. Utfør funksjonskontroll med belastet stol, en person i stolen.	
1.4.1. Løft/hvile 	
1.4.2. Rygg 	
1.4.3. Tilt (Kun Nova 30) 	
1.5. Kontroller håndkontroll for skader.	
1.5.1. Display	
1.5.2. Kabel	
2. Mekanikk	
2.1. Rengjør stolens mekanikk/stålunderstell.	
2.2. Kontroller mekanikk, stag og braketter for deformasjon/skader.	
2.2.1. Svingelement med wire	

	Kontrollert
2.2.2. Løftemekanikk	
2.2.3. Tilt (kun Nova 30)	
2.2.4. Rygg	
2.2.5. Nakkevinkling	
2.2.6. Fotbrett	
2.3. Kontroller alle festepunkter for løse skruer/klips, stram eventuelt til.	
3. Understell	
3.1. Dersom sving, kontroller at svingen går i lås.	
3.2. Kontroller at filtknotter er funksjonelle under trefoten.	
3.3. Dersom transporthjul, kontroller at hjulene løper fritt og er uten skader.	
4. Komfortsonen (sete - rygg - armlene - fotbrett - nakkepute)	
4.1. Skum og tekstil/hud er byttet i henhold til hjelpemiddelsentralens gjenbruksbestemelser.	
4.1.1. Ryggtrekk	
4.1.2. Armlenstopp	
4.1.3. Armlensside	
4.1.4. Fotbrett m/kanal	
4.1.5. Sittepute	
4.1.6. Nakkepute	
4.2. Tekstiler/hud som ikke er byttet skal være rene og uten skader og/eller defekter. Se vaskeanvisning på tekstil/hud.	
4.3. Kontroller at ryggtrekk er festet med klips og glidelås i bakkant.	
4.4. Kontroller festepunktene til armlenene.	
4.5. Kontroller festepunktene til fotbrettet.	
5. Juster stolens innstillinger i henhold til hjelpemiddelsentralens gjenbruksbestemelser	
5.1. Armlenehøyde	
5.2. Setehøyde	
5.3. Setedybde	
5.4. Setebredde	
5.5. Fotbrettlengde	
5.6. Rettløft/skråløft	
6. Merking	
6.1. Kontroller at merking av stolen samsvarer med oversikt i brukermanualen	
7. Brukermanual	
7.1. Kontroller at brukermanualen er tilgjengelig.	