

JAY® J2 Djup

VIKTIG KONSUMENTINFORMATION

OBS:

Denna manual innehåller endast kortfattade instruktioner gällande användande av denna produkt. Vänligen läs också den fullständiga bruksanvisningen för produkten innan produkten används.

ANVÄNDARE:

Innan du använder denna produkt, vänligen läs den fullständiga bruksanvisningen och spara den sedan för framtida behov.

Kortbruksanvisning



Sunrise Medical rekommenderar att en läkare, terapeut eller rehabtekniker, med erfarenhet av sitsprodukter och positionering, gör bedömningen huruvida en Jay J2 Djup dyna är lämplig.

PLACERING AV DYNAN

Dynan bör sträcka sig fram till 2,5 - 5 cm från knävecken. Lägg sittdynan mot ryggstödet på rullstolen, med materialinformationsetiketterna samt fluiddynan i bakkant. Sittgropen skall vara vänd uppåt.

ENKEL SKÖTSEL & RENGÖRING

Regelbunden rengöring och underhåll kan hjälpa dig utöka livslängden för din sittdyna. Vi rekommenderar att de olika delarna kontrolleras under rengöringen.

Kontrollera överdraget för revor och överdrivet slitage:

1. Avlägsna överdraget och kontrollera abnormiteter (från insidan ut).
2. Kontrollera skumbasen för nedbrytning eller avnötning.

Rengöring av överdrag:

1. Avlägsna det yttre överdraget från skumbasen och förslut blixtlåset.
2. Maskintvätta i 70 grader och dropptorka eller torktumla på låg värme. Ingen strykning krävs eller föreslås.

Rengöring av skumbas:

1. Avlägsna det yttre överdraget från skumbasen och torka försiktigt med en fuktig trasa. Använd aldrig tvål. Doppa aldrig ned i vatten. Torka av med en ren trasa.
2. Låt dynan lufttorka fullständigt före ominstallation.
3. Rengöring av fluidinlägget:
 - a. Avlägsna överdraget från skumbasen.
 - b. Avlägsna fluidinlägget och torka av med varmt vatten och tvål.
 - c. Torka av med en ren trasa.
 - d. Återinstallera fluidinlägget och fäst sedan överdraget tillbaka över skumbasen.

OBS: Se till att den bakre delen av överdraget passar ihop med den bakre delen av skumbasen.

4. Rengöring av tillbehörsdelar:

- a. Avlägsna överdraget från skumbasen och vätskedyna(or), vid behov för att rengöra tillbehörsdelar.
- b. Avlägsna tillbehörsdelar. Tvätta ren med varmt vatten och tvål.
- c. Torka av med en ren trasa.
- d. Återinstallera tillbehörsdelar och vätskedyna(or) och fäst sedan överdraget tillbaka över skumbasen.

OBS: Se till att den bakre delen av överdraget passar ihop med den bakre delen av skumbasen.

ÅTERINSTALLATION AV J2 /J2 DC DYNAN EFTER RENGÖRING

Följ anvisningarna för rengöring och skötsel under rubriken "Enkel skötsel och rengöring" och sätt sedan ihop dynan igen enligt följande:

1. Fäst vätskedynan till skumbasen.
2. Fäst de bakre tre Velcro® kardborrbanden först, sedan de två främre två Velcro® kardborrbanden.
3. Vecken i den bakre delen av dynan kommer automatiskt att skrynkla dynan för dig.
4. Det bör finnas många veck i vätskedynan.
5. Detta maximerar tryckavlastningen och hjälper till att reducera klippning genom att dynan tillåts att anpassa sig till benutskott.

Max brukarvikt: 150 kg



This product is manufactured to comply with the 'Medical Device Directive' 93/42/EEC and 2007/47/EEC.

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel: +46 (0) 31-748 37 00
Fax: +46 (0) 31-748 37 37
www.sunrisemedical.se