

# NOVA

6.0 Oppdatert mai 2025

**NOVA**

Stol med opprisingsfunksjon.  
Individuell elektrisk regulering (tilt,  
ryggvinkel og oppreisingsfunksjon)



Nova 30 DK 4

# NOVA



## DEN MEST KOMPLETTE OPPREISINGS-STOLEN VI NOENSINNE HAR LAGET

- **Gjennomtenkte og brukervennlige funksjoner og løsninger**
- **Mange tilpasningsmuligheter i standard utførelse – raske, enkle og trygge å utføre**
- **Bredt spekter av tilbehør for ytterligere individuell tilpasning og praktisk bruk**
- **Ergonomisk og særdeles godt bevegelsesmønster**
- **Svært god komfort**
- **Smale varianter**
- **Rygg med stabil vinkling av øvre del**
- **Svært enkel høydejustering**
- **Særdeles enkel gjenbruk og service**
- **Økt sikkerhet**

Sunrise Medical har utviklet og levert oppreisingsstoler til det norske markedet i over 20 år. Totalt har vi levert godt over 20 000 stoler. Det er basert på denne erfaringen og kompetansen, samt tilbakemeldinger fra markedet, at vi tilbyr en oppgradert versjon av Nova.

Nova utvikles kontinuerlig for å gi deg de beste løsningene.

- Oppgradert nakkepute for bedre posisjonering og enklere vedlikehold
- Oppgradert rygg og fothviler, gir omsluttende støtte for økt stabilitet og komfort
- Utløserhendel for sving på begge sider som standard for maksimal fleksibilitet
-  Nytt oppheng for håndkontroll  
hensiktsmessig utformet og plassert. Oppheng på begge sider som standard for fleksibelt bruk og enda enklere gjenbruk.

Nova kan tilpasses mange ulike personer, noe som reduserer både lager og behovet for individuelle tilpasninger.

Ergonomiske og behagelige bevegelser i stolen, sammen med høykvalitetsmaterialer i trekk og skum, gir svært god sittekomfort. Nova leveres med tilt for økt variasjon i sittestillingen. Vinkelreguleringen av nakkestøtten gir hodet variert og stabil støtte i alle posisjoner.

Gjenbruk og service er ivaretatt i konstruksjon og design. Trekk og slidedeler skiftes med et enkelt håndgrep, og med minimal bruk av verktøy, tid og ressurser.

Nova har gjennomgått utførlige tester og framstår som en særdeles trygg og sikker stol.



Aktivitet

## HJELP OPP AV GO'STOLEN



Oppreisingsfunksjonen følger kroppens bevegelser og gir støtte og stabilitet hele veien opp av stolen, og ned igjen.

Bevegelsen understøtter det naturlige oppreisingsmønsteret. Fotbrettet går inn under stolen, slik at bena kan plasseres godt inn under setet, før kroppsvekten flyttes kontrollert fra stolen og over på bena. Ryggen følger med setet fremover, og bidrar til å lette siste del av oppreisningen. Ergonomiske og stabile grep i framkant av armlenet gir trygghet. Personen kommer trygt opp i stående stilling med minst mulig bruk av krefter.

Nova 30 leveres standard med både skråløft og rettløft, avhengig av bruk av de elektriske funksjonene seteløft og tilt. Nova 30 trenger derfor ikke stilles om for å oppnå rettløft.

Det finnes en alternativ håndkontroll for synkronisert



rettløft tilgjengelig som tilbehør



Komfort

## HVILE



Fra sittende stilling kan Nova bevegges mykt og komfortabelt til en god hvilestilling. Ved vinkelregulering av ryggen oppstår ingen skyvkrefter. I hvilestilling kan bena heves opp i nivå med hjertet, noe som gir god avlastning for hovne ben. Ved bruk av tilt, flyttes deler av kroppsvekten

fra sete til rygg. Dette gir støtte og stabilitet for hele kroppen i hvileposisjon. Det er i denne posisjonen personen oppnår revitaliserende hvile.

De elektriske funksjonene er trinnløst regulerbare og gir nesten et uendelige antall posisjoner å velge mellom.

# KONTROLLERTE BEVEGELSER

En god håndkontroll er viktig for å kunne bruke stolens funksjoner på en optimal måte. Gjennom design og funksjon guider Novas håndkontroll brukeren til å velge rett funksjon - hver gang.


Den ergonomiske formen gjør at håndkontrollen ligger godt i hånden. Hver funksjon er opphøyet slik at man føler hvor man skal trykke. Håndkontrollen gir tydelige tilbakemeldinger ved trykk. Rammen rundt hver funksjon hjelper brukeren med å navigere på håndkontrollen.

Symbolene har en logisk oppbygging og fargen oransje indikerer aktivitet mens hvit indikerer hvile.

Det er enkelt å flytte håndkontrollen til den siden hvor man har best håndfunksjon.

Håndkontrollen styrer pålitelige og svært stillegående Linak-motorer. Motorene har innebygget fysiske endebrytere som sikrer motorene mot feilbruk og gir lengre levetid.

Sunrise Medical har oppfylt økte sikkerhetskrav i henhold til de nyeste standardene. Dette medfører at vi har en ny håndkontroll med IP24 sikkerhet. Det vil blant annet si at den er beskyttet mot sprutende vann i alle retninger.

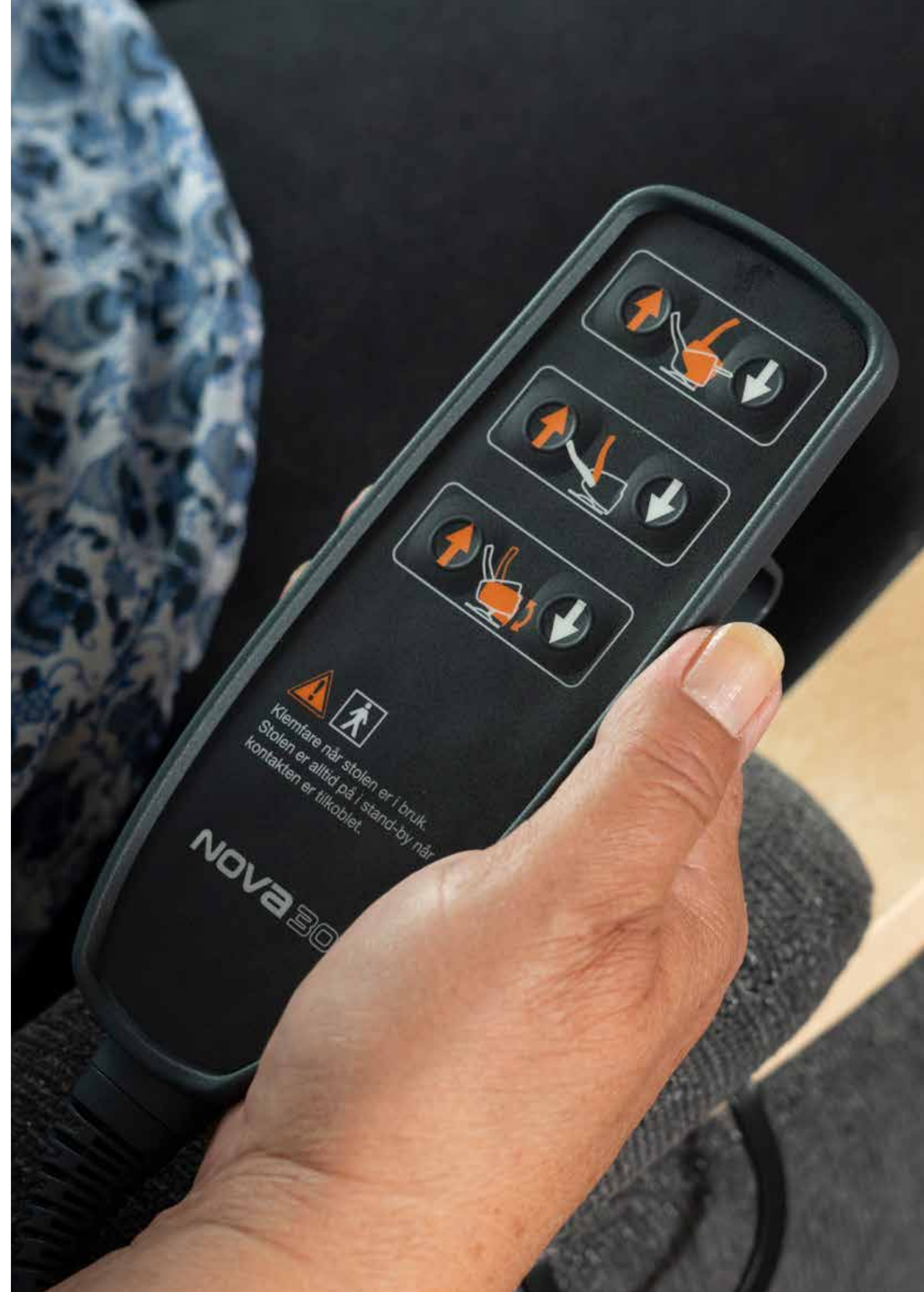

## SKRÅLØFT/RETTLØFT

Nova 30 leveres standard med både skråløft og rettløft, avhengig av bruk av de elektriske funksjonene seteløft og tilt.

For noen få (vanligvis de som ikke skal-kan stå på sine ben – ofte rullestolbrukere) kan det være aktuelt med rettløft. Da er det gjerne sideveis forflytning, enten ved at armene nedjusteres eller at man forflytter seg på skrå ut av stolen (ofte over til en rullestol).

Husk at man også kan få Nova med elektriske armlener som gjør justering av armlenehøyden lettere. Vi har valgt å gjøre omstilling til rettløft så enkelt som mulig. Dette gjøres ved å bytte til ulike håndkontroller.



Oppbygging av trekk og skum gir god komfort og støtte for kroppen i alle posisjoner.


Nærmest brukeren er det norsk møbeltekstil eller hud. Tekstilet har pustende egenskaper og er behagelig, allergivennlig og mykt. Det tåler hard bruk og har gode egenskaper i forhold til vaskbarhet. Stoffets brannhemmende egenskaper oppretholdes selv etter utallige vask. Huden er allergivennlig, komfortabel og enkel å tørke av.

Skummet i ryggen og setet er bygget opp av to lag – en formstøpt, fast base og et mykt komfortskum nærmest brukeren. Ryggen har ryggkiler for omsluttende støtte og økt komfort. Ryggkilene kan tas bort dersom ønskelig.

Seteputen ligger på en fjærende setebunn som tilbyr ekstra avlastning og komfort.

Brede armlenetopper fylt med mykt skum gir god støtte og komfort for underarmene.

Fothvileren gir god plass til leggmuskelen slik at denne ikke utsettes for trykk og benet kan hvile i en nøytral stilling. Fothvileren har en fasong som sikrer at bena blir liggende på plass, selv med nedsatt førlighet.

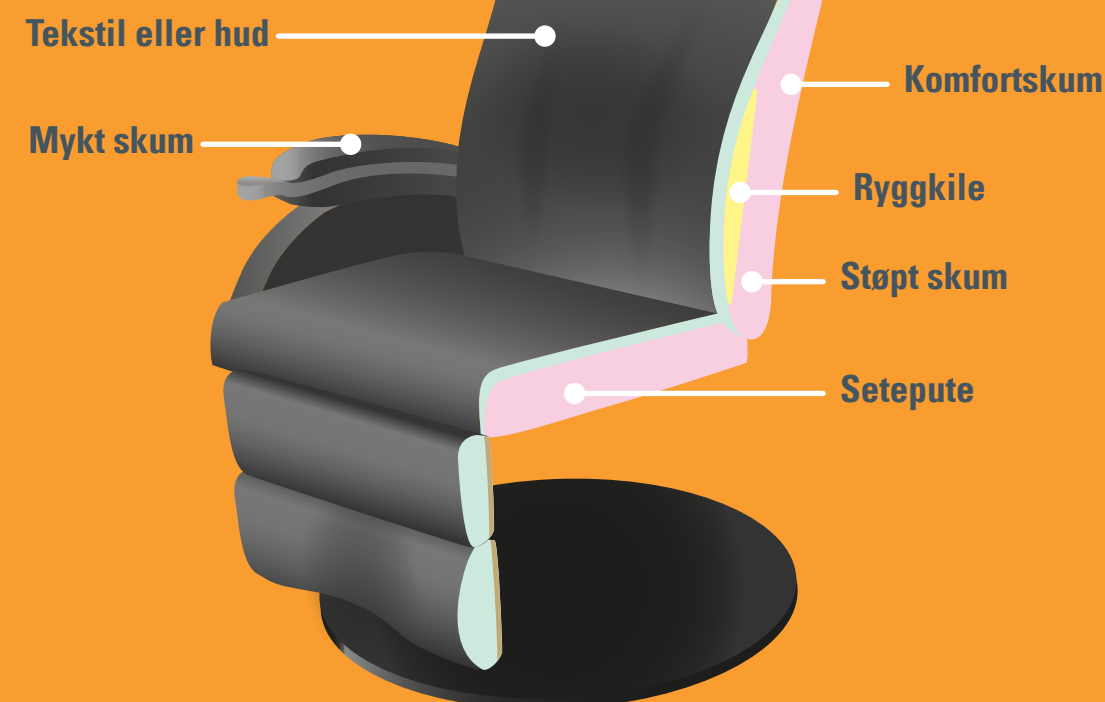



## KOMFORT OG STØTTE FOR HODET

Nakkeputen gir unik stabilitet og komfort. Et fastere skum i nedkant og langs sidene gir stabilitet til hodet, samtidig som et mykt materiale i midten av puten gir plass og avlastning til bakhodet.

Puten kan plasseres stabilt i ulike posisjoner, alt etter hva som fungerer for den enkelte. Da trekket på nakkeputen fort kan bli tilgriset, er det enkelt å vaske stofftrekket i vaskemaskin.

**Fastere kanter  
gir stabilitet**


**Myk i midten  
for komfort**



## VINKLET NAKKESTØTTE

I tillegg til den behagelige ergonomiske formen, har ryggen en vinkelregulerbar nakkestøtte som gir ytterligere tilpasningsmuligheter og komfort for den som sitter lenge.

Nakkestøtten er trinnløst vinkelregulerbar og gir god og stabil støtte for hodet ved for eksempel lesing, håndarbeid eller TV titting.

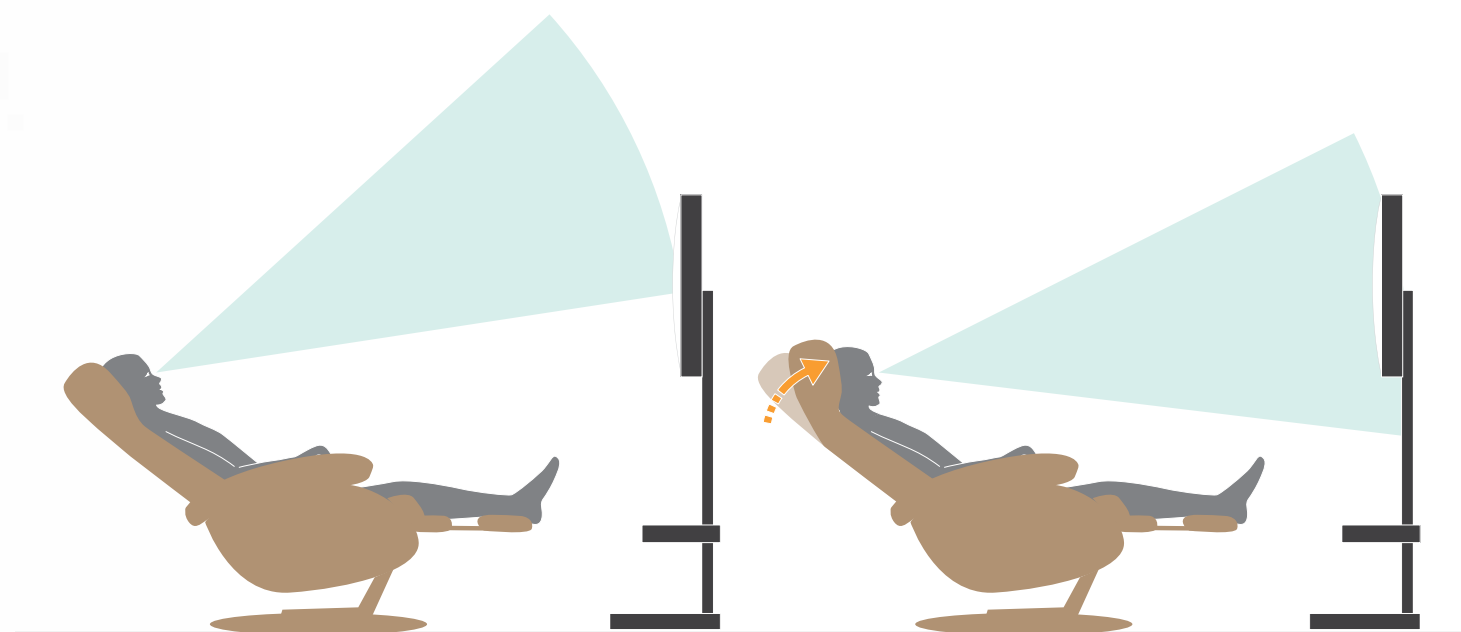

## STILREN DESIGN

Nova er ikke bare et oppreisingshjelpemiddel – den er også et flott møbel som passer godt inn i ethvert hjem. Nova har en stilren og luftig utforming. Velg mellom komfortabel tekstil eller stilig sort hud.



## EN SÆRDELES SIKKER STOL

Vår kunnskap er basert på over 20 års erfaring og produksjon av 20 000 stoler. Trygghet i hverdagen gir økt bevegelse og aktivitet. Nova innehar en rekke detaljer som ivaretar personens sikkerhet.

- Ergonomiske armlenshåndtak som gir god støtte og stabilitet når personen skal reise seg opp, eller sette seg i stolen.
- Stolen støtter kroppens naturlige bevegelsesmønster og gir sikker oppreising.
- Fotbrettet felles inn slik at personen får bena godt innunder seg ved oppreising.
- Stolens konstruksjon gjør den meget stabil i alle posisjoner.
- Fotbrettet har gassdempere som gir etter ved belastning. Dette reduserer klemfare dersom fotbrettet kjøres ut mot en vegg eller annen gjenstand. Man unngår også velt dersom noe tungt plasseres på fotbrettet.
- Svingfunksjon med 100% trygg og stabil låsing og ny forbedret utløsermekanisme gjør det trygt og enkelt å svinge stolen fra kaffebordet til en funksjonell oppreisingsposisjon.
- Robuste løsninger i konstruksjon og mekanikk sikrer trygg, sikker og stabil bruk i hele oppreisingsstolens levetid

I samarbeid med akkreditert testinstitutt, er Nova utviklet og testet i henhold til de nyeste standardene, blant annet:

- IEC/EN 60601-1 Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.
- IEC/EN 60601-1-11 Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment.
- IEC/EN 60601-1-6 Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance. Collateral standard: Usability.
- IEC/EN 60601-1-2 Elektromedisinsk utstyr - Del 1-2: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlige ydelser. Sideordnet norm: Elektromagnetiske forstyrrelser. Krav og prøvinger.
- EN 1021-1/2 Møbler - Vurdering av antenningelighet for stoppede møbler.
- EN 597-1/2 Møbler - Vurdering av antenningelighet av madrasser og stoppede sengebunnen.
- EN 16139 Møbler - Styrke, holdbarhet og sikkerhet. Krav til sittemøbler utenom husholdning.
- EN 1022 Hjemmemøbler - Sittemøbler - Bestemmelse av stabilitet.
- EN 1335-3 Kontormøbler - Kontorarbeidsstol - Del 3: Prøvmåter.
- EN 1728 Møbler - Sittemøbler - Prøvmåter for bestemmelse av styrke og holdbarhet.



## MILJØ I FOKUS

Sunrise Medical AS jobber kontinuerlig med forbedring av alle våre produkter.

Vi har gjennom flere år lagt ned en betydelig innsats for å ivareta klima- og miljøhensyn, både internt i vår produksjon på Lillehammer og i samarbeid med våre leverandører. Det benyttes lokale og anerkjente leverandører, som alle har et stort fokus på miljø.

Det kanskje viktigste enkelttiltaket for å redusere klima- og miljøbelastningen er å sikre at produktet har lang levetid. I tillegg til å velge solide kvalitetsløsninger blir levetiden forlenget ved å legge til rette for at produktet enkelt skal kunne repareres og gjenbrukes.

Nova er konstruert slik at det er enkelt;


- å endre oppsett, bytte ut og/eller reparere nødvendige komponenter i forbindelse med gjenbruk, slitasje, ettersyn og reparasjon.



- å skille de ulike materialene i stolen fra hverandre for kildesortering ved gjenbruk og ved kassasjon. Etter kildesortering går samtlige komponenter til gjenvinning.



## SERVICE, VEDLIKEHOLD OG GJENBRUK

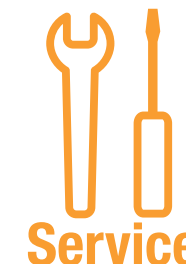

Gjennom design og konstruksjon av Nova oppreisingsstol har vi søkt å ivareta terapeuters og servicepersonalets behov for en enklere hverdag.

- Lett tilgjengelige servicepunkter.
- Minimal bruk av verktøy.
- Svært enkelt å skifte slidedeler som for eksempel tekstiler.
- Mange felleskomponenter for enklere håndtering.
- Ryggen kan felles ned, og med hendige bærehåndtak (tilbehør) blir det enklere å transportere stolen.
- Høy kvalitet som varer lenge, kombinert med rimelige gjenbrukskostnader, gir lavere livsløpskostnader på produktet.



Alle tekstiler er utstyrt med glidelås slik at de er enkle å bytte.



Tydelige måleskalaer med avmerkede standardposisjoner forenkler innstilling og gjenbruk.

### SVÆRT ENKEL SETEHØYDEJUSTERING

Juster setehøyden trinnløst helt uten tunge løft og bruk av krefter. Fjern seteputen for å komme til justeringsskruen. Etter at oppreisningfunksjonen er kjørt litt opp, kan setehøyden justeres raskt og enkelt. Tilpasningen sikrer at alle brukere kan sitte trygt og godt med bena i gulvet.



Nova 30 er bygget opp av ulike moduler. Det finnes flere muligheter for tilpasninger, innstillinger og tilbehør.



#### FÅ KOMPONENTER GIR:

- Enklere og rimeligere lagerhold, men samtidig stor fleksibilitet med få deler.
- Forenklet service.
- Samme løsninger i alle modellene gjør det enkelt å tilegne seg servicekompetanse.
- Enklere brukertilpasninger da modellene har lik oppbygging.
- Samme tilbehør til begge modeller.


## NOVA 30



- Assistanse når man setter seg ned og ved oppreising.
- Aktivitet og hvile gjennom stillingsendringer. Kombinert med tilt gir dette uendelig antall posisjoner å velge mellom.
- Tre motorer: Individuell regulering av oppreising/hvile, rygg, tilt.

- Nova leveres i fem ulike varianter – høy, standard, lav, smal standard og smal lav. I tillegg har stolen innbygget en rekke relevante og enkle innstillingsmuligheter, slik at Nova kan tilpasses hver enkelt.
- Svingfot med utløserhendel på begge sider, eller hjulunderstell
  - Høy, standard eller lav rygg
  - Justering av setehøyde
  - Justering av setebredde
  - Justering av setedybde
  - Regulering av armlenkehøyde
  - Justering av leggstøtte
  - Rettløft eller skråløft
  - Ytterligere tilpasninger i form av tilbehør

## TRE HØYDER DEKKER ALLE BRUKERE
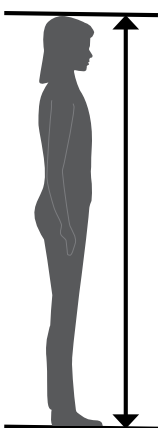
| Brukerhøyde                                                                        | Setehøyde |                         |                                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
|                                                                                    |           | Lav/Smal lav<br>40 - 48 | Standard/Smal standard<br>43-51 | Høy<br>52-60 |
|  | 200+      |                         |                                 |              |
|                                                                                    | 200       |                         |                                 |              |
|                                                                                    | 195       |                         |                                 |              |
|                                                                                    | 190       |                         |                                 |              |
|                                                                                    | 185       |                         |                                 |              |
|                                                                                    | 180       |                         |                                 |              |
|                                                                                    | 175       |                         |                                 |              |
|                                                                                    | 170       |                         |                                 |              |
|                                                                                    | 165       |                         |                                 |              |
|                                                                                    | 160       |                         |                                 |              |
|                                                                                    | 155       |                         |                                 |              |
|                                                                                    | 150       |                         |                                 |              |
|                                                                                    | 145       |                         |                                 |              |

For å ha optimal nytte av Nova, er det nødvendig å velge riktig størrelse i forhold til personen som skal benytte stolen. Tabellen gir en pekepinn på hvilke personer som kan passe i de ulike stolene. I tillegg til å velge riktig variant, kan man tilpasse stolen individuelt til personen. Alle tilpasninger utføres raskt, trygt og enkelt. Måleskalaer veileder deg til riktig innstilling. Fysisk endestopper sikrer at


delere ikke kan falle fra hverandre og gir trygg tilpasning. De fleste tilpasninger utføres ved å løsne, flytte og deretter stramme. Raskt og enkelt, uten løse skruer.

 Vi har laget enkle instruksjonvideoer som viser flere av innstillingsmulighetene. Finn QR koder til filmene i brukermanualen eller se de på vår webside.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

|                                  | Smal lav                                 | Smal standard                            | Lav                                      | Standard                                         | Høy                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>A</b> Setehøyde               | 40 - 48 cm                               | 43 - 51 cm                               | 40 - 48 cm                               | <b>43 - 51 cm</b>                                | 52 - 60 cm                               |
| <b>B</b> Setedybde               | 42 - 53 cm                               | 42 - 53 cm                               | 42 - 53 cm                               | <b>42 - 53 cm</b>                                | 42 - 53 cm                               |
| <b>C</b> Setebredde              | 47 - 55 cm                               | 47 - 55 cm                               | 53 - 61 cm                               | <b>53 - 61 cm</b>                                | 53 - 61 cm                               |
| <b>D</b> Armlenkehøyde           | 8 - 28 cm                                | 5 - 25 cm                                | 8 - 28 cm                                | <b>5 - 25 cm</b>                                 | 5 - 25 cm                                |
| <b>E</b> Rygghøyde <sup>1)</sup> | 72 cm                                    | 80 cm                                    | 72 cm                                    | <b>80 cm</b>                                     | 80 cm                                    |
| <b>F</b> Leggstøttelengde        | 47 - 54 cm                               | 47 - 54 cm                               | 47 - 54 cm                               | <b>47 - 54 cm</b>                                | 51 - 58 cm                               |
| <b>G</b> Total høyde             | 112 - 120 cm                             | 122-130 cm                               | 112 - 120 cm                             | <b>122-130 cm</b>                                | 130-138 cm                               |
| <b>H</b> Total bredde            | 72 cm                                    | 72 cm                                    | 76 cm                                    | <b>76 cm</b>                                     | 76 cm                                    |
| <b>I</b> Total lengde            | 156 cm                                   | 164 cm                                   | 156 cm                                   | <b>164 cm</b>                                    | 168 cm                                   |
| <b>J</b> Vinkel nakkestøtte      | 0° - 30°                                 | 0° - 30°                                 | 0° - 30°                                 | <b>0° - 30°</b>                                  | 0° - 30°                                 |
| <b>K</b> Tilt                    | 8° - 23°                                 | 8° - 23°                                 | 8° - 23°                                 | <b>8° - 23°</b>                                  | 8° - 23°                                 |
| <b>L</b> Maksimal ryggåpning     | 100° - 125° m/tilt<br>100° - 140° u/tilt | 100° - 125° m/tilt<br>100° - 140° u/tilt | 100° - 125° m/tilt<br>100° - 140° u/tilt | <b>100° - 125° m/tilt<br/>100° - 140° u/tilt</b> | 100° - 125° m/tilt<br>100° - 140° u/tilt |
| Svingområde                      | 270°                                     | 270°                                     | 270°                                     | <b>270°</b>                                      | 270°                                     |
| Stolens vekt <sup>2)</sup>       | Fra 61 kg                                | Fra 61 kg                                | Fra 61 kg                                | <b>Fra 61 kg</b>                                 | Fra 61 kg                                |
| Maksimal brukervekt              | 150 kg                                   | 150 kg                                   | 150 kg                                   | <b>150 kg</b>                                    | 150 kg                                   |

<sup>1)</sup> Andre rygghøyder er tilgjengelige som tilbehør, se side 21.  
<sup>2)</sup> Vekten varierer avhengig av stolens størrelse og konfigurasjon.

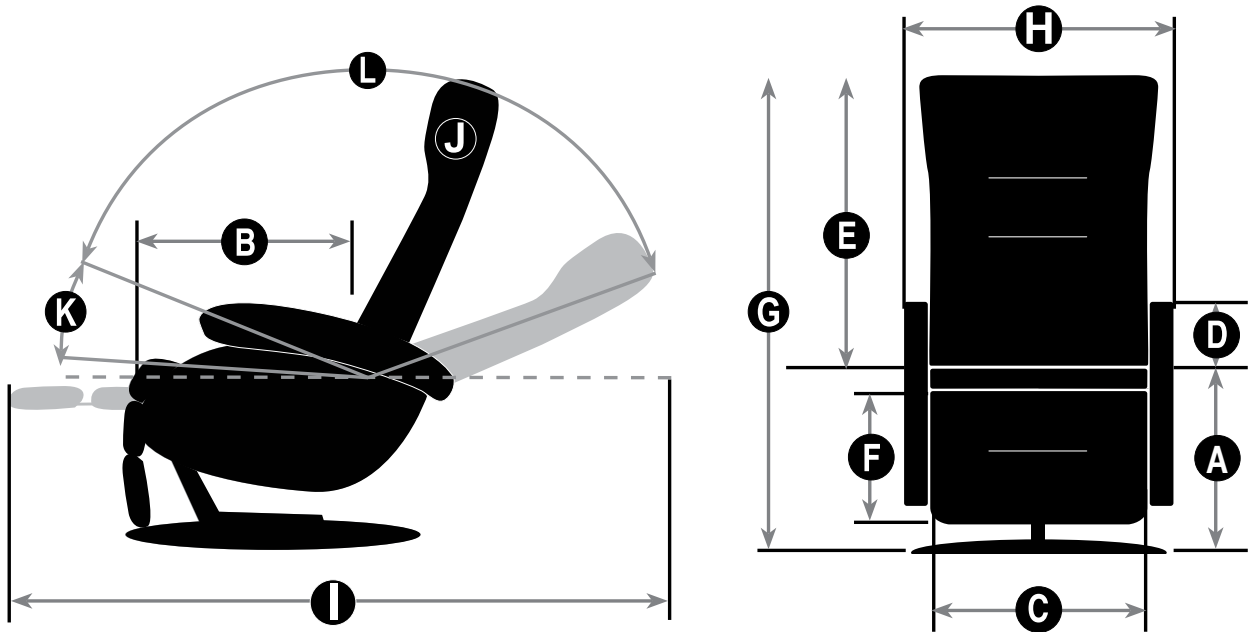



## Tilpasning

Nova har svært mange enkle og relevante innstillingsmuligheter innebygget i stolens konstruksjon. Til tross for dette kan det være behov for ytterligere tilpasninger i forhold til for eksempel komfort, praktiske bruk eller sikkerhet. Et rikt utvalg tilbehør gir alle muligheter for optimal tilpasning. Alt tilbehør er enkelt å montere, i mange tilfeller uten bruk av verktøy.

## TILBEHØR



### NAKKEPUTE ERGO

Et fastere skum i nedkant og langs sidene gir stabilitet til hodet, samtidig som et mykt materiale i midten av puten gir plass og avlastning til bakhodet. Denne nakkeputen er standard.

|                |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------|-------------------|----------|-------------|
| Nakkepute Ergo | Skifergrått stoff | 12778005 | 241595      |
| Nakkepute Ergo | Sort hud          | 27788005 | 241596      |



### NAKKEPUTE LITEN

En fastere og mindre nakkepute enn nakkeputen som leveres med Nova som standard. b 32 cm, h 19 cm, d 7 cm.


|                 |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-----------------|-------------------|----------|-------------|
| Nakkepute liten | Skifergrått stoff | 12778008 | 241489      |
| Nakkepute liten | Sort hud          | 12788008 | 241490      |



### NAKKEPUTE STOR

Ved utilstrekkelig støtte i standard nakkepute, kan det velges en større nakkepute. Den store nakkeputen kan leveres med vattfyll eller med saccokuler. Fylt med saccokuler kan den store nakkeputen formes etter brukerens behov. Saccokulene magasinerer også varme, og kan virke lindrende på verkende muskulatur. b 35 cm, h 23 cm, d 10 cm.

|                |             |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------|-------------|-------------------|----------|-------------|
| Nakkepute stor | Vatt        | Skifergrått stoff | 12778006 | 241485      |
| Nakkepute stor | Vatt        | Sort hud          | 12788006 | 241486      |
| Nakkepute stor | Sacco kuler | Skifergrått stoff | 12778007 | 241487      |
| Nakkepute stor | Sacco kuler | Sort hud          | 12788007 | 241488      |

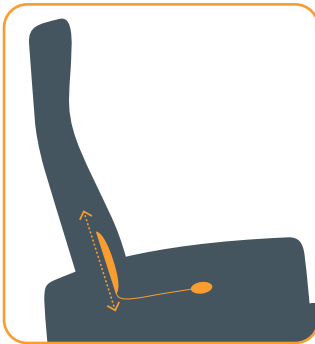

### KORSRYGGPUTE

Ryggen på Nova er ergonomisk formet. Noen kan likevel oppleve at de ikke får tilstrekkelig støtte i korsryggen. Nova kan utstyres med en korsryggpute som er justerbar i høyde og regulerbar i tykkelse.

Høyden innstilles en gang. Tykkelsen på korsryggputen tilpasses ved å pumpe luft inn i og slippe luft ut av puten.

Å sitte med riktig støtte i ryggen, gjør at brukeren unngår muskelsmerter flere steder i kroppen.



|                                                | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------------------------|----------|-------------|
| Korsryggpute med pumpe, lav/standard/høy       | 12734650 | 159426      |
| Korsryggpute med pumpe, smal standard/smal lav | 12634650 | 248814      |



### RYGGTREKK MYKT

Noen brukere kan ha behov for en ekstra myk rygg. Dette kan løses ved å sette på et mykt ryggtrekk. Trekket gjør ryggen myk i hele ryggens lengde, uten å endre formen på ryggen.

|                 |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-----------------|-------------------|----------|-------------|
| Ryggtrekk, mykt | Skifergrått stoff | 12778010 | 241491      |
| Ryggtrekk, mykt | Sort hud          | 12788010 | 241492      |



### RYGGTREKK TILPASNING KANALER PÅ TVERS

Ryggen på Nova har en ergonomisk form, og bidrar i stor grad til stolens sittekomfort. Noen brukere kan imidlertid ha behov for en annen form på ryggen, for eksempel ved kyfose. Dette kan løses ved å sette på et ryggtrekk med kanaler på tvers. Trekket har tre kamre, og en pute i hvert kammer. Putetykkelse 6 cm. Med dette tilbehøret kan ryggen få en helt ny form, for eksempel ved at et kammer enten er uten pute, eller har 2 puter.

|                                                 |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Ryggtrekk tilpasning, kanaler på tvers, 3 puter | Skifergrått stoff | 12778020 | 241493      |
| Ryggtrekk tilpasning, kanaler på tvers, 3 puter | Sort hud          | 12788020 | 241494      |



### RYGGTREKK TILPASNING KANALER PÅ LANGS

Ved behov for ekstra stabilitet sideveis, eller ved ønske om en mer omsluttende rygg, kan Nova utstyres med ryggtrekk tilpasning kanaler på langs. Ryggtrekket består av to kanaler på hver side med ulik tykkelse på fyll. Tykkelsen på fyllet kan tilpasses individuelt, avhengig av behovet for støtte.

|                                        |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Ryggtrekk tilpasning, kanaler på langs | Skifergrått stoff | 12778025 | 241495      |
| Ryggtrekk tilpasning, kanaler på langs | Sort hud          | 12788025 | 241496      |



### RYGGTREKK TILPASNING MULTI

Ved behov for en annen form på ryggen, for eksempel ved kyfose eller skoliose, kan Nova utstyres med ryggtrekk tilpasning Multi. Ryggtrekket består av 11 kamre, med fyll i hvert kammer. Med dette tilbehøret kan ryggen få en helt ny form, for eksempel ved at et eller flere kammer er uten fyll, eller har mer fyll.

|                            |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Ryggtrekk tilpasning Multi | Skifergrått stoff | 12778026 | 296391      |
| Ryggtrekk tilpasning Multi | Sort hud          | 12788026 | 296390      |



### RYGG

Vi er alle unike. Dersom standard rygg høyde er uhensiktsmessig, kan rygg høyden endres ved å bytte rygg. Riktig rygg høyde sikrer optimal støtte for hele overkroppen og sikrer at nakkestøttevinkelen havner på rett sted.

|                                |             |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|--------------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------|
| Rygg lav/standard/høy          | høyde 88 cm | Skifergrått stoff | 12974000 | 241523      |
| Rygg lav/standard/høy          | høyde 88 cm | Sort hud          | 12984000 | 241524      |
| Rygg (std rygg: standard/høy)  | høyde 80 cm | Skifergrått stoff | 12774000 | 241525      |
| Rygg (std rygg: standard/høy)  | høyde 80 cm | Sort hud          | 12784000 | 241526      |
| Rygg (std rygg: lav)           | høyde 72 cm | Skifergrått stoff | 12874000 | 241527      |
| Rygg (std rygg: lav)           | høyde 72 cm | Sort hud          | 12884000 | 241528      |
| Rygg (std rygg: smal/standard) | høyde 80 cm | Skifergrått stoff | 12674000 | 241529      |
| Rygg (std rygg: smal/standard) | høyde 80 cm | Sort hud          | 12684000 | 241530      |
| Rygg (std rygg: smal/lav)      | høyde 72 cm | Skifergrått stoff | 12674005 | 241531      |
| Rygg (std rygg: smal/lav)      | høyde 72 cm | Sort hud          | 12684005 | 241532      |



### SIDESTØTTER

Sidestøtter som er fleksible og enkle å tilpasse etter behov. Enkelt utsvingbar for sideveis forflytning og bruk av bord.

|                              |  | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------|--|----------|-------------|
| Sidestøtte komplett, høyre   |  | 12700580 |             |
| Sidestøtte komplett, venstre |  | 12700581 |             |



### ARMLENE ELEKTRISK NEDFELLBART

Elektrisk nedfellbare armlener for enkel forflytning og enklere manøvrering av armlenet.

|                                    |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Armlene elektrisk nedfellbart, par | Skifergrått stoff | 12775030 | 296327      |
| Armlene elektrisk nedfellbart, par | Sort hud          | 12785030 | 296326      |



INKONTINENSTREKK

Noen brukere kan ha behov for et inkontinenstrekk på seteputen. Dette trekkes utenpå seteputen og går et stykke opp på ryggen, slik at denne også beskyttes når uhellet er ute. Trekket er sort og kan dekkes av et varetrekk om ønskelig. Husk at en bruker som trenger et inkontinenstrekk ofte trenger 2 stk; et som sitter på stolen og et som er til vask.

|                                                       |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Inkontinenstrekk til setepute, lav/standard/høy       | Sort Dahlia stoff | 12778045 | 241503      |
| Inkontinenstrekk til setepute, smal standard/smal lav | Sort Dahlia stoff | 12678045 | 241504      |



VARETREKK

Seteputen, nakkeputen og armlenetopper er blant de deler på stolen som slites mest. Med et varetrekk holder originaltrekket seg pent lenger. Varetrekket trekkes utenpå puten. Varetrekket kan også benyttes over inkontinenstrekk for å beholde et ens utseende.

|                                     |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Varetrekk, lav/standard/høy         | Skifergrått stoff | 12778040 | 241501      |
| Varetrekk smal standard/smal lav    | Skifergrått stoff | 12678040 | 241502      |
| Varetrekk nakkepute + armlenetopper | Skifergrått stoff | 12778050 | 328911      |



SETEPUTE EKSTRA MYK

Setepute i ekstra mykt skum.

|                         |            |             |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------|------------|-------------|-------------------|----------|-------------|
| Setepute, standard/høy  | Ekstra myk | sd 42-53 cm | Skifergrått stoff | 12773010 | 241533      |
| Setepute, standard/høy  | Ekstra myk | sd 42-53 cm | Sort hud          | 12783010 | 241534      |
| Setepute, lav           | Ekstra myk | sd 42-53 cm | Skifergrått stoff | 12873010 | 241535      |
| Setepute, lav           | Ekstra myk | sd 42-53 cm | Sort hud          | 12883010 | 241536      |
| Setepute, smal standard | Ekstra myk | sd 42-53 cm | Skifergrått stoff | 12673010 | 241537      |
| Setepute, smal standard | Ekstra myk | sd 42-53 cm | Sort hud          | 12683010 | 241538      |
| Setepute, smal lav      | Ekstra myk | sd 42-53 cm | Skifergrått stoff | 12673011 | 241539      |
| Setepute, smal lav      | Ekstra myk | sd 42-53 cm | Sort hud          | 12683011 | 241540      |



SETEPUTE VISKOELASTISK TOPP

Setepute i lagdelt skum der øverste lag er 2 cm viskoelastisk skum.

|                         |                    |             |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------|-------------|
| Setepute, standard/høy  | Viskoelastisk topp | sd 42-53 cm | Skifergrått stoff | 12773015 | 241541      |
| Setepute, standard/høy  | Viskoelastisk topp | sd 42-53 cm | Sort hud          | 12783015 | 241542      |
| Setepute, lav           | Viskoelastisk topp | sd 42-53 cm | Skifergrått stoff | 12873015 | 241543      |
| Setepute, lav           | Viskoelastisk topp | sd 42-53 cm | Sort hud          | 12883015 | 241544      |
| Setepute, smal standard | Viskoelastisk topp | sd 42-53 cm | Skifergrått stoff | 12673015 | 241545      |
| Setepute, smal standard | Viskoelastisk topp | sd 42-53 cm | Sort hud          | 12683015 | 241546      |
| Setepute, smal lav      | Viskoelastisk topp | sd 42-53 cm | Skifergrått stoff | 12673016 | 241547      |
| Setepute, smal lav      | Viskoelastisk topp | sd 42-53 cm | Sort hud          | 12683016 | 241548      |




SETEPUTERAMME

Seteputerammen benyttes som underlag for trykksårforebyggende pute. Trykksårforebyggende pute med stabil base, for eksempel JAY, kan benyttes rett på den fjærende sete bunnen.

Mål utsparing lav/standard/høy: b 45 cm, d 49 cm.

Mål utsparing smal standard/smal lav: b 39 cm, d 49 cm.

|                                       |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|---------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Seteputeramme, lav/standard/høy       | Skifergrått stoff | 12778030 | 241497      |
| Seteputeramme, lav/standard/høy       | Sort hud          | 12788030 | 241498      |
| Seteputeramme, smal standard/smal lav | Skifergrått stoff | 12678030 | 241499      |
| Seteputeramme, smal standard/smal lav | Sort hud          | 12688030 | 241500      |

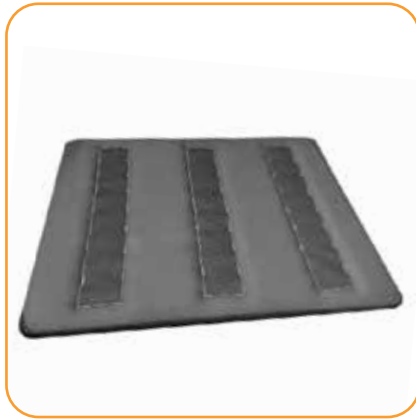

PLANSETE

Plansete benyttes som underlag for trykksårforebyggende pute med luft. Trykksårforebyggende pute med stabil base, for eksempel JAY, kan benyttes rett på den fjærende sete bunnen.

|                                  |  | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------------------------|--|----------|-------------|
| Plansete, lav/standard/høy       |  | 12733200 | 296363      |
| Plansete, smal standard/smal lav |  | 12633200 | 296364      |



### UTFORINGSPUTER

Utforingsputer er tilbehøret for de som trenger en smalere setebredde. Putene er 4 cm brede, og gjør det mulig å redusere setebredden med 8 cm.

|                        |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Utforingsputer, 2x4 cm | Skifergrått stoff | 12775512 | 241505      |
| Utforingsputer, 2x4 cm | Sort hud          | 12785512 | 241506      |



### STØTTEPUTE

Den ekstra store puten har en bananform og er fylt med saccokuler. Saccokulene gjør at puten kan formes etter brukerens behov. Puten kan brukes ved behov for ekstra støtte, for eksempel til støtte for en hemiplegisk arm. Str. 75x35 cm.

|                        |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Støttepute             | Skifergrått stoff | 12778009 | 241507      |
| Støttepute             | Sort hud          | 12788009 | 241508      |
| Støttepute legg, sacco | Skifergrått stoff | 12778015 | 328906      |
| Støttepute legg, sacco | Sort hud          | 12788015 | 328907      |



### ELEKTRISK SVING

For personer med redusert hånd- eller fingerfunksjon der svingutløserhendel blir vanskelig å utløse, eller for personer som ikke kan svinge stolen ved hjelp av bena. Svingutslag 120 grader (+/- 5 grader).

|                                          | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------------------|----------|-------------|
| Elektrisk sving, tre motor, standard/lav | 12739100 | 295758      |
| Elektrisk sving, tre motor, høy          | 12939100 | 296898      |
| Elektrisk sving, to motor, standard/lav  | 12739150 |             |
| Elektrisk sving, to motor, høy           | 12939150 |             |



### HÅNDKONTROLL RETTLØFT

For Nova 30 kan skrått- eller rettløft velges ved hjelp av standard håndkontroll, avhengig av bruk av løft og tilt. Ved behov for en enklere betjening av rettløft, finnes håndkontroll med synkronisert rettløft til Nova 30.

|                                 | Art. nr. | HMS art.nr. |
|---------------------------------|----------|-------------|
| Håndkontroll rettløft tre motor | 12737111 | 296362      |
| Håndkontroll rettløft to motor  | 12737114 | 328909      |



### HÅNDKONTROLL SVING

For personer med redusert hånd- eller fingerfunksjon der svingutløserhendel blir vanskelig å utløse, eller for personer som ikke kan svinge stolen ved hjelp av bena. Svingutslag 120 grader (+/- 5 grader).

|                                        | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------------------------------|----------|-------------|
| Håndkontroll tre motor, sving          | 12737112 | 317494      |
| Håndkontroll to motor, sving           | 12737121 | 328910      |
| Håndkontroll tre motor rettløft, sving | 12737113 | 328908      |



### HÅNKONTROLL ENKEL

For personer som har vansker med å forholde seg til flere knapper/funksjoner.

|                              | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------|----------|-------------|
| Håndkontroll to motor, enkel | 12737124 | 328912      |



### HÅNDKONTROLL MED STORE BRYTERE

Ved redusert hånd- eller fingerfunksjon kan det være nødvendig med større brytere for å kunne betjene stolens funksjoner. Håndkontroll med store brytere har trykklette brytere som er enkel å betjene.

|                                       | Art. nr. | HMS art.nr. |
|---------------------------------------|----------|-------------|
| Håndkontroll store brytere, to motor  | 12737108 | 241511      |
| Håndkontroll store brytere, tre motor | 12737109 | 241512      |



### HÅNDKONTROLL MED VIPPEBRYTERE

Dersom det er nødvendig å betjene stolen ved hjelp av for eksempel hele hånden, vil håndkontroll med vippebrytere være et åpenbart valg. Stolens funksjoner kan betjenes ved hjelp av større bevegelser.

|                                      | Art. nr. | HMS art.nr. |
|--------------------------------------|----------|-------------|
| Håndkontroll vippebrytere, to motor  | 12737208 | 241513      |
| Håndkontroll vippebrytere, tre motor | 12737209 | 241514      |



### HÅNDKONTROLL JOYSTICK

Løser betjening av Nova uten å måtte trykke på en eneste knapp. Enkel og god løsning for personer som har vanskeligheter med å betjene knapper, eller føler seg utrygge på å betjene flere knapper.

|                                 | Art. nr. | HMS art.nr. |
|---------------------------------|----------|-------------|
| Håndkontroll joystick, to motor | 12737150 | 298409      |



### HOLDER FOR HÅNDKONTROLL

Dersom det er vanskelig å holde håndkontrollen i hånden samtidig som stolen betjenes, kan standard håndkontroll monteres i en holder. Holderen holder håndkontrollen stabil mens stolen betjenes. Holderen kan monteres valgfritt høyre eller venstre side. Passer til standard håndkontroll.

|                                           | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------------------------|----------|-------------|
| Holder for standard håndkontroll          | 12737115 | 241522      |
| Holder for håndkontroll med store brytere | 12737118 | 295503      |



### USB KONTAKT

For lading av telefon, nettbrett og lignende.

|             | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------|----------|-------------|
| USB kontakt | 12738175 |             |



BATTERIBACKUP

Nova er kontinuerlig koblet til strømnettet. For ekstra trygghet ved eventuelt strømbrydd, kan batteribackup monteres. Ved bruk av batteribackup kan stolen kjøres til en stilling der bruker kommer trygt ut av stolen.

|               | Art. nr. | HMS art.nr. |
|---------------|----------|-------------|
| Batteribackup | 12737106 | 241521      |



BORD

Ha enkel tilgang til viktige eiendeler, og kanskje kaffekoppen? Bordet er montert på stolens sokkel og holder seg vannrett uavhengig av regulering av stolen. Bordet svinges til side for enkel ut- og innstigning.  
Bord lite: b 33,5 cm, d 25,5 cm.  
Bord stort: b 43,5 cm, d 33,5 cm.

|                                        | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------------------------------|----------|-------------|
| Bord lite                              | 12738100 | 241509      |
| Bord stort                             | 12738101 | 241510      |
| Bord lite til Nova med hjulunderstell  | 12738200 | 296338      |
| Bord stort til Nova med hjulunderstell | 12738201 | 295461      |



MULTIFESTE FOR NETTBRETT

Hold deg oppdatert på epost, nettaviser eller sosiale medier mens du sitter i stolen. Hva med en Skypesamtale eller en yndlingsserie på Netflix? Multifestet passer de fleste nettbrett og kan reguleres til en optimal plassering.

|                                             | Art. nr. | HMS art.nr. |
|---------------------------------------------|----------|-------------|
| Multifeste for nettbrett, opp til 11 tommer | 12738160 | 241516      |



MULTIFESTE FOR SMARTTELEFON

Hold deg oppdatert på telefonsamtaler, sms eller sosiale medier mens du sitter i stolen. Kanskje en sjekk innom nettavisene og eposten? Multifestet passer de fleste smarttelefoner og kan reguleres til en optimal plassering.

|                                               | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-----------------------------------------------|----------|-------------|
| Multifeste for smarttelefon, 4,3 - 6,7 tommer | 12738161 | 241517      |



KOPPHOLDER

Oppbevar vannflasken eller en kaffekopp lett tilgjengelig. Trygg og stabil koppholder som kan monteres valgfritt på høyre eller venstre side.

|            | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------|----------|-------------|
| Koppholder | 12738190 | 241520      |



KRYKKEHOLDER

Fest krykkene til stolen ved forflytning til stolen slik at de er lett tilgjengelig når du trenger de igjen. Krykkeholderen har plass til to krykker og kan monteres på høyre eller venstre side.

|              | Art. nr. | HMS art.nr. |
|--------------|----------|-------------|
| Krykkeholder | 12738180 | 241519      |



HJULUNDERSTELL

Hjulunderstellet gjør det mulig å forflytte stolen mens bruker sitter i stolen. Setehøyde på hjulunderstell er ca 2 cm høyere enn på standard understell.

|                | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------|----------|-------------|
| Hjulunderstell | 12731552 | 097472      |



TRANSPORTHJUL

Transporthjulene monteres bak på trefoten og gjør det lett å flytte på Nova. Stolen tippes godt bakover slik at stolens balansepunkt blir på hjulene, og stolen kan trilles på disse. Transporthjul er standard på alle stoler med oppreisingsfunksjon som leveres ut via NAV.

|                        | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------|----------|-------------|
| Transporthjul svingfot | 12731541 | 027598      |



LØFTESTENGER

En oppresingsstol kan oppleves tung og uhåndterlig når den skal flyttes fra rom til rom eller opp en trapp. For å bidra til en riktig arbeidsstilling for de som skal flytte stolen, har vi utviklet praktiske og trygge løftestenger.

|                                           | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------------------------|----------|-------------|
| Løftestenger, sett: 2 x fremre, 2 x bakre | 12738150 | 241515      |



SVEIV FOR SETEHØYDEJUSTERING

Praktisk sveiv for setehøydejustering. Juster setehøyden trinnløst helt uten tunge løft og bruk av krefter. Fjern seteputen for å komme til justeringsskruen. Etter at oppreisningsfunksjonen er kjørt litt opp, kan setehøyden justeres raskt og enkelt.

|                              | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------|----------|-------------|
| Sveiv for setehøydejustering | 12738155 | 241549      |



GJENBRUKSPAKKE ENKEL

Enkel gjenbrukspakke består av nakkepute Ergo, armlenstopp og setepute

|                                     |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Gjenbrukspakke enkel, lav           | Skifergrått stoff | 12870015 | 296345      |
| Gjenbrukspakke enkel, standard/høy  | Skifergrått stoff | 12770015 | 296351      |
| Gjenbrukspakke enkel, smal standard | Skifergrått stoff | 12670015 | 296349      |
| Gjenbrukspakke enkel, smal lav      | Skifergrått stoff | 12670016 | 296347      |
| Gjenbrukspakke enkel, lav           | Sort hud          | 12880015 | 296344      |
| Gjenbrukspakke enkel, standard/høy  | Sort hud          | 12780015 | 296350      |
| Gjenbrukspakke enkel, smal standard | Sort hud          | 12680015 | 296348      |
| Gjenbrukspakke enkel, smal lav      | Sort hud          | 12680016 | 296346      |



GJENBRUKSPAKKE KOMPLETT

Komplett gjenbrukspakke består av nakkepute Ergo, sidevange med armlenstopp, ryggtrekk, ryggskum, fotbrett og setepute

|                                        |                   | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Gjenbrukspakke komplett, lav           | Skifergrått stoff | 12870025 | 296355      |
| Gjenbrukspakke komplett, standard      | Skifergrått stoff | 12770025 | 296361      |
| Gjenbrukspakke komplett, høy           | Skifergrått stoff | 12970025 | 296353      |
| Gjenbrukspakke komplett, smal standard | Skifergrått stoff | 12670025 | 296359      |
| Gjenbrukspakke komplett, smal lav      | Skifergrått stoff | 12670026 | 296357      |
| Gjenbrukspakke komplett, lav           | Sort hud          | 12880025 | 296354      |
| Gjenbrukspakke komplett, standard      | Sort hud          | 12780025 | 296360      |
| Gjenbrukspakke komplett, høy           | Sort hud          | 12980025 | 296352      |
| Gjenbrukspakke komplett, smal standard | Sort hud          | 12680025 | 296358      |
| Gjenbrukspakke komplett, smal lav      | Sort hud          | 12680026 | 296356      |

# NOVA MODELL- OG VARIANTOVERSIKT

| Delkontrakt 4<br>Stol med individuell elektrisk regulering<br>(tilt, ryggvinkel og oppreisingsfunksjon) |                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| NOVA 30                                                                                                 | Art. nr.        | Hms. art.nr.  |
| Stoff skifergrå                                                                                         |                 |               |
| Nova 30 smal lav sving stoff skifergrå                                                                  | 19675000        | 296321        |
| Nova 30 smal standard sving stoff skifergrå                                                             | 19670000        | 296323        |
| Nova 30 lav sving stoff skifergrå                                                                       | 19870000        | 296319        |
| <b>Nova 30 standard sving stoff skifergrå</b>                                                           | <b>19770000</b> | <b>296325</b> |
| Nova 30 høy sving stoff skifergrå                                                                       | 19970000        | 296317        |
| Hud sort                                                                                                |                 |               |
| Nova 30 smal lav sving hud sort                                                                         | 19685000        | 296320        |
| Nova 30 smal standard sving hud sort                                                                    | 19680000        | 296322        |
| Nova 30 lav sving hud sort                                                                              | 19880000        | 296318        |
| <b>Nova 30 standard sving hud sort</b>                                                                  | <b>19780000</b> | <b>296324</b> |
| Nova 30 høy sving hud sort                                                                              | 19980000        | 296316        |

# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181  
peter.eggli@sunrisemedical.no

## Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987  
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027  
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181  
peter.eggli@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frøde Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frøde Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
julie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.