



Korsryggpute

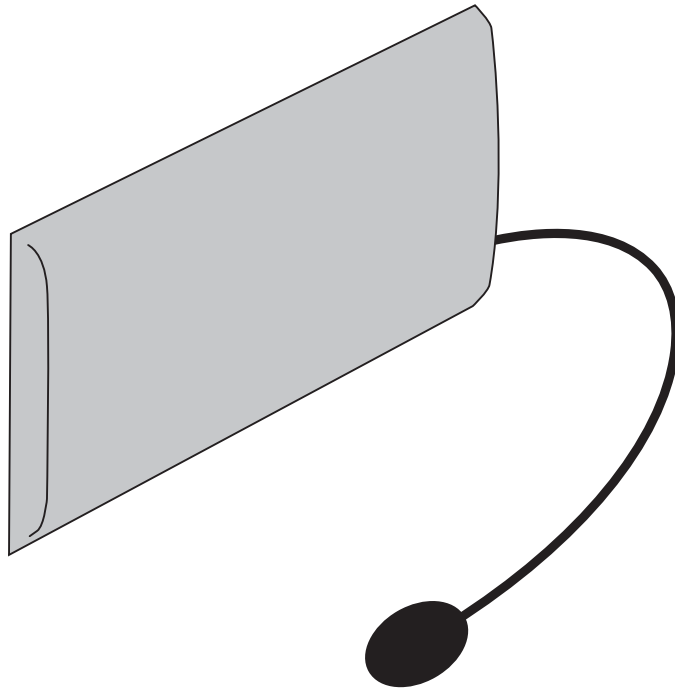

Beskrivelse	Artikkelnummer
Pute korsrygg, luft, høyderegulerbar Nova 20, Nova 30	2734650

NOVA




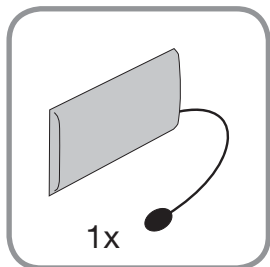


Klargjøring av oppreisingsstolen for montering av korsryggpute

- Åpne glidelåsen bak på ryggtrekket og løsne nedre del av ryggtrekket foran og bak. Dra trekket oppover mot toppen av ryggen.
- Trekk nedre del av ryggskummet framover og ut fra ryggplaten.

Montering og instilling av korsryggputen

1. Demonter ryggfjæren **A**.
2. Skru ut låserattene **B** (Hø+Ve) i korsryggputen. Stikk de gjengede boltene på baksiden av korsryggputen inn i slissene **C** på ryggplaten.
3. Skru låserattene til de gjengede boltene og juster til riktig høyde før du skrur til låserattene helt.
4. Juster tykkelsen på puten ved å pumpe inn- eller slippe ut luft.

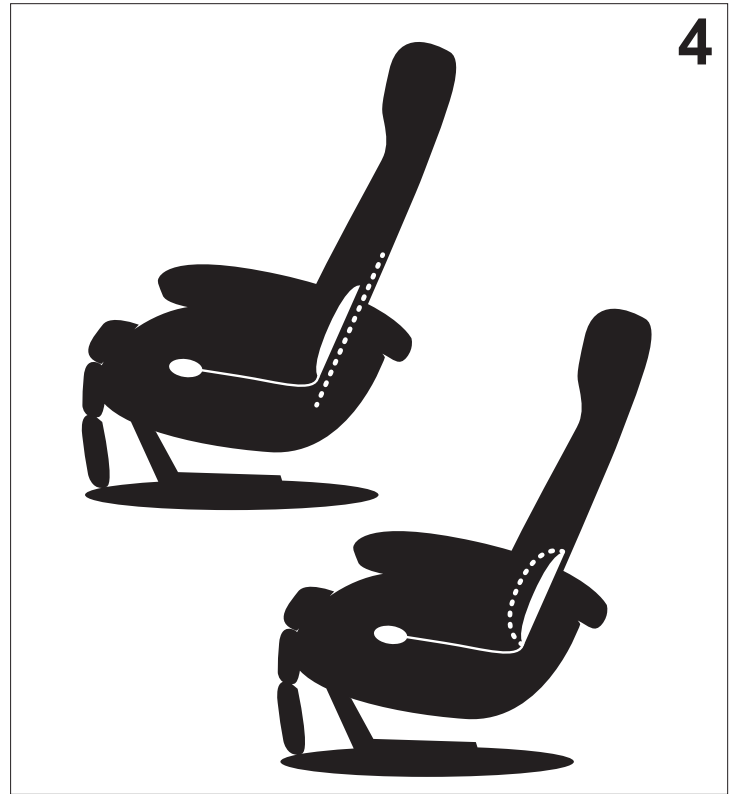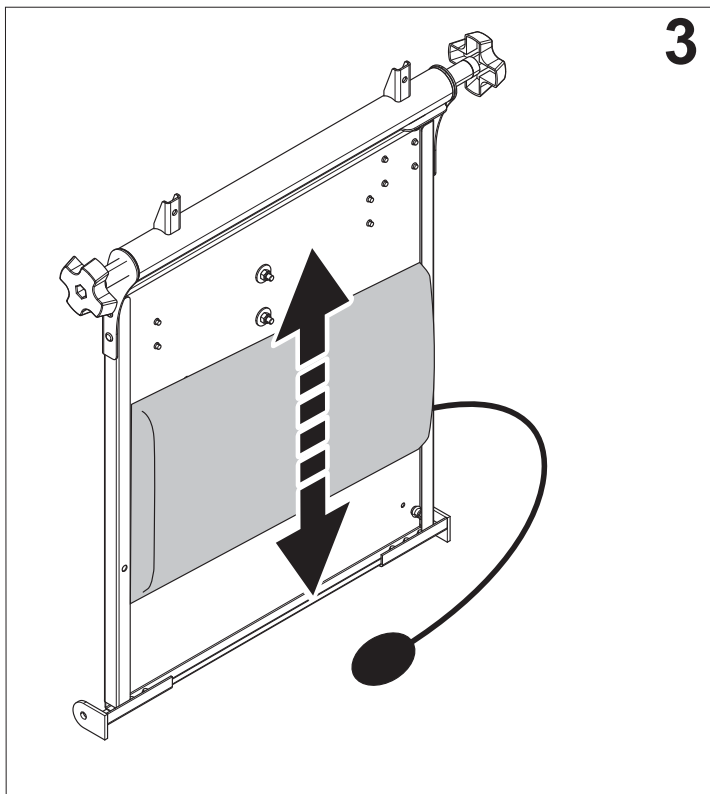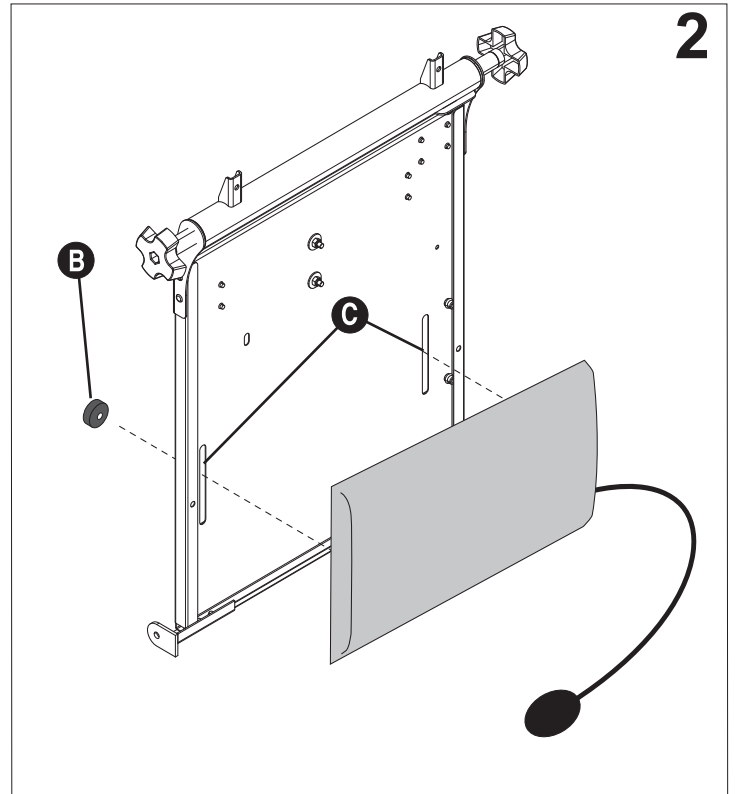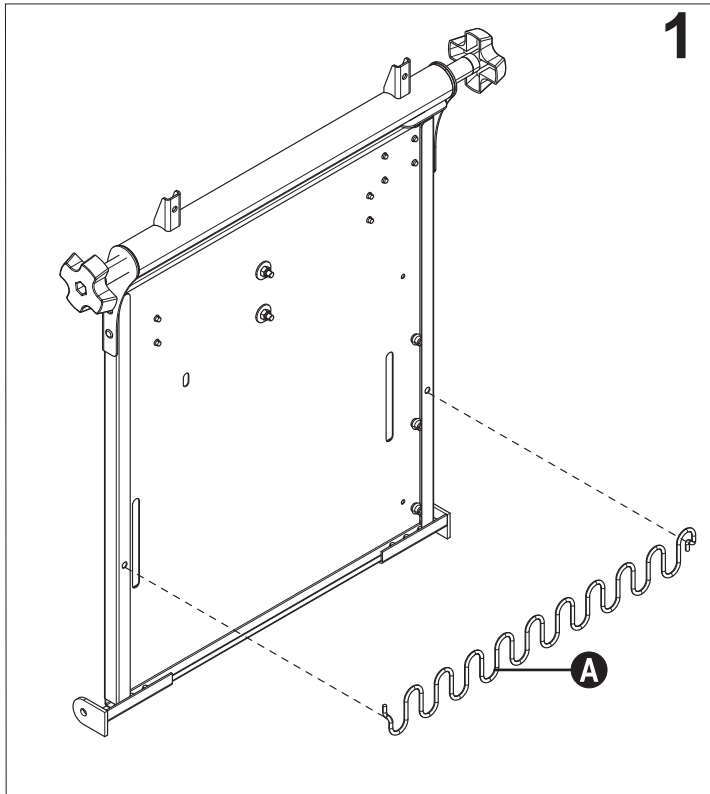



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no