




MONTERINGSANVISNING

Hjulunderstell

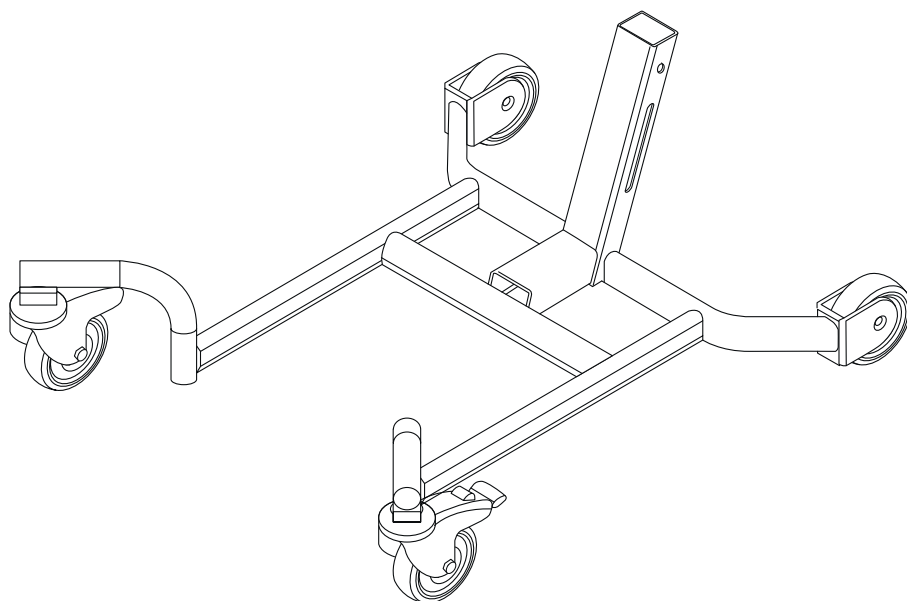

Beskrivelse	Artikkelnummer
Hjulunderstell	12731552

NOVA

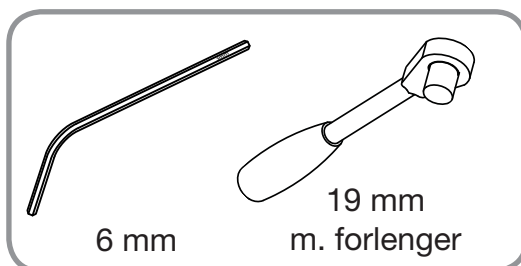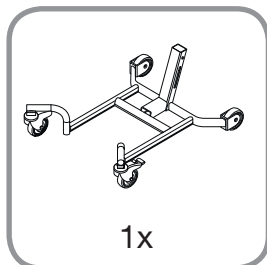

Forberedelser




- Legg oppreisingsstolen på siden på et rent underlag.

Demontering av sokkel med fot

1. Skru ut skruene **A** og demonter sokkel med fot **B**.

Montering av hjulunderstell

2. Før hjulunderstellet **C** opp i søylekanalen.
3. Skru til skruene **A**. Benytt Blå Loctite nr 243. Påse at søylen løper lett med lik klaring på begge sider.

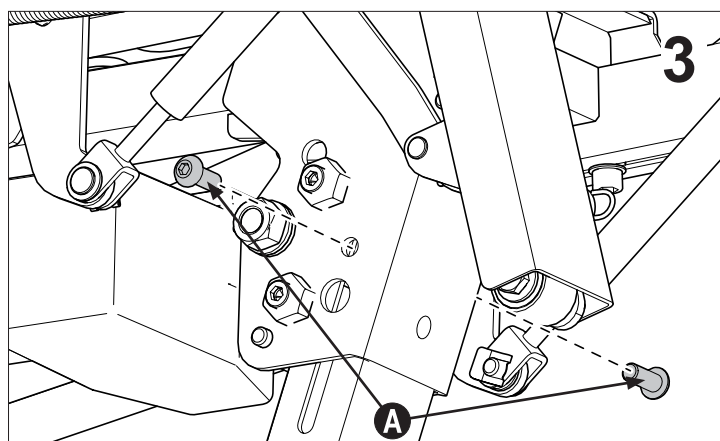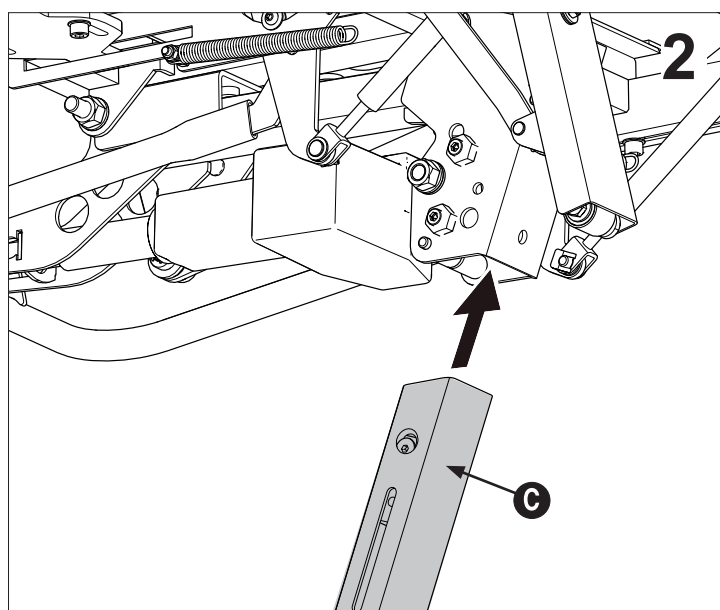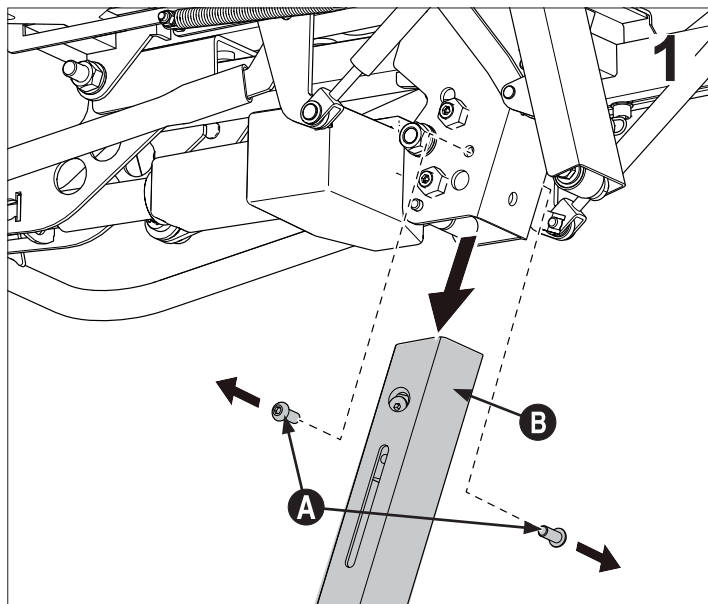

Innstilling av setehøyde

- Reis stolen opp slik at den står på hjulunderstellet.
- Lås hjulene.
- Ta ut seteputen.
- Kjør seteløft til setet er plant.







4. Påse at skruen **E** er løs. Løsne skruene **D** slik at søylen **B** løper fritt. Måleskala **C** på søylen indikerer setehøyden i cm.
5. Plasser sveiv eller pipenøkkel med forlenger innvendig i søylen **F** og skru stolen til ønsket høyde. Trekk til skruene **D** og **E**.
6. Det kan være nødvendig å etterjustere slik at setet blir plant og ikke heller mot høyre eller venstre. Skruen **E** plasseres i øvre eller nedre hull og skrues til slik at setet blir plant. Bruk eventuelt vater som hjelpemiddel. Det kan også være nødvendig å løsne skruene **D** for å gjennomføre denne justeringen.

Påse at alle skruer er strammet når du er ferdig med høydejusteringen.

⚠ Advarsel!

Juster fotbrett lengden etter at setehøyden er justert. Minimum klaring fra fotbrettet til sokkelen er 1 cm.

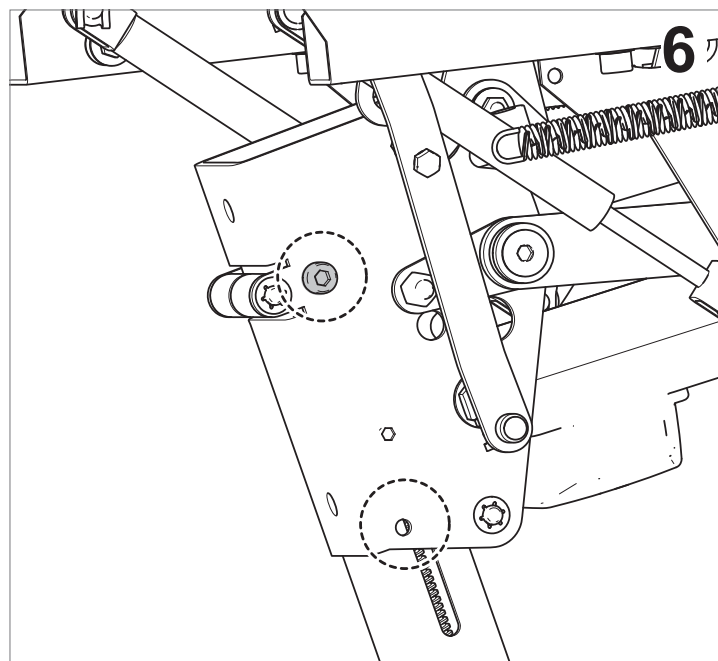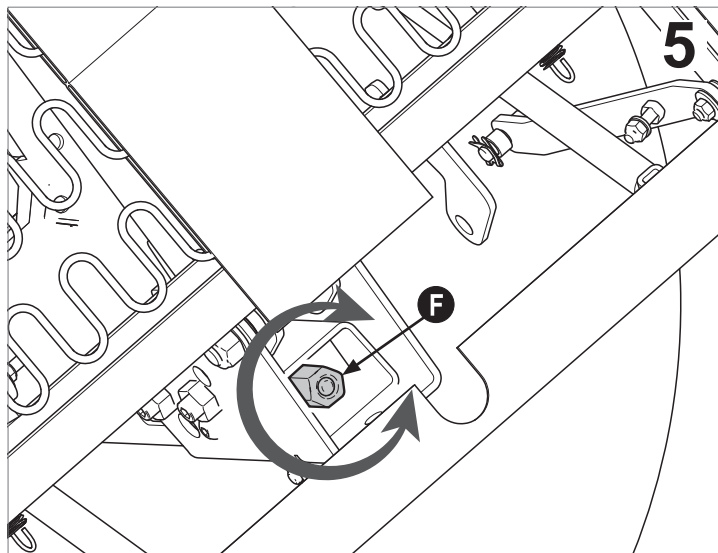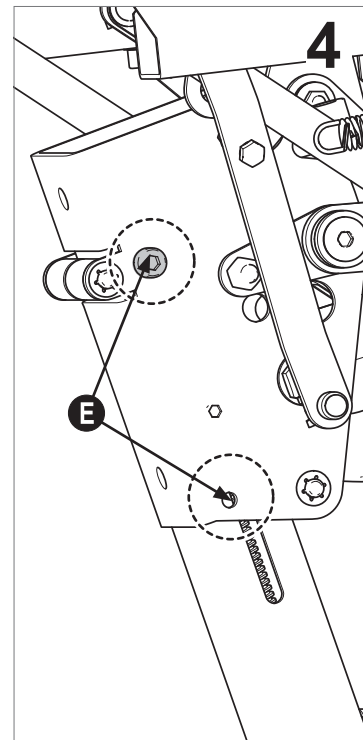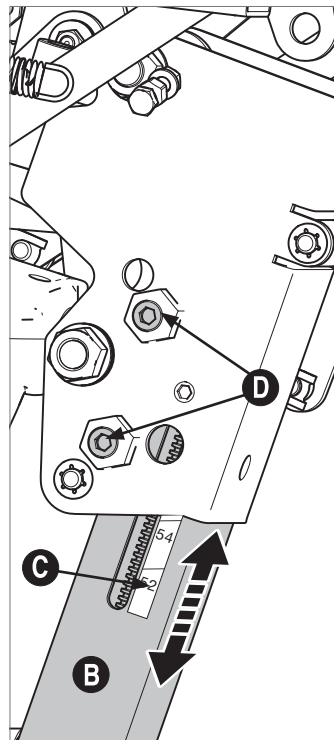



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no